

# IHRE ENDO-BEHANDLUNG UNTER VERWENDUNG DES SICAT ACCESSGUIDES

Bitte beachten Sie den folgenden Workflow um ein positives Ergebnis Ihrer Behandlung sicherzustellen:

1

## SITZ DES ACCESSGUIDE

Garantieren Sie zu jeder Zeit den eindeutigen, korrekten und sicheren Sitz.



2

## FARBMARKIERUNG

Kennzeichnen und prüfen Sie die Stelle, die Sie trepanieren wollen.



3

## ZAHNSCHMELZ ABTRAGEN

Tragen Sie Zahnschmelz oder Restauration an der markierten Stelle ab.



4

## BOHRTIEFE ÜBERTRAGEN

Nutzen Sie Lineal und Gummistop.



5

## NICHT ROTIEREND EINFÜHREN


Starten Sie den Bohrer erst, wenn er Kontakt zum Zahn hat.



6

## INTERMITTIEREND ARBEITEN

Prüfen Sie regelmäßig den korrekten Verlauf.

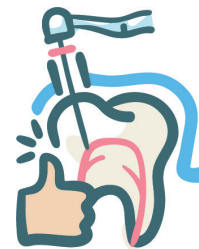

SICAT 

**HERSTELLER**  
SICAT GMBH & CO. KG  
FRIESDORFER STR. 131-135  
53175 BONN  
DEUTSCHLAND  
WWW.SICAT.COM

**LOKALER SUPPORT**  
SGL@SICAT.COM

MAT-NR: 1067011DE  
DOK-ID: DD33POG001  
STAND: 2021-02-08

# IHRE ENDO-BEHANDLUNG UNTER VERWENDUNG DES SICAT ACCESSGUIDES

Bitte beachten Sie während der Behandlung auch nachfolgende Hinweise:



▶ **OKKLUSALE HÖHE**

Stellen Sie sicher, dass **genug Platz** vorhanden ist.

▶ **NICHT HEBELN**

Führen Sie den Bohrer **stets gerade** durch die Bohrhülse, ohne deren Position zu verändern.

▶ **WASSERKÜHLUNG**

Führen Sie die Bohrung unter **ständiger Kühlung** durch.

▶ **UMDREHUNGEN PRO MINUTE**

Halten Sie sich an die Vorgaben des Herstellers. SICAT empfiehlt **maximal 5000 RPM** zu nutzen.

▶ **SPÜLUNG DES KANALS**

Entfernen Sie **regelmäßig** die entstandenen Rückstände.



**FÜR EINE UMFASSENDE PRODUKTINFORMATION NUTZEN SIE  
BITTE DIE SICAT ACCESSGUIDE GEBRAUCHSANWEISUNG.**

SICAT 

 **HERSTELLER**

SICAT GMBH & CO. KG  
FRIESDORFER STR. 131-135  
53175 BONN  
DEUTSCHLAND  
WWW.SICAT.COM

**LOKALER SUPPORT**

SGL@SICAT.COM

MAT-NR: 1067011DE  
DOK-ID: DD33POG001  
STAND: 2021-02-08