

SICATJMT⁺




SICAT JMT⁺ - VORBEREITUNG DES SICAT FUSION BITES

Kurzanleitung | Deutsch

VORBEREITUNG DES SICAT FUSION BITES

Kurzanleitung

Um die 3D-Röntgenaufnahme mit den Unterkieferbewegungsdaten registrieren zu können, benötigt der Patient sowohl während der DVT-Aufnahme als auch vor der Aufnahme der individuellen Unterkieferbewegungen mit dem SICAT JMT* den SICAT Fusion Bite. Dieser wird wie folgt vorbereitet:

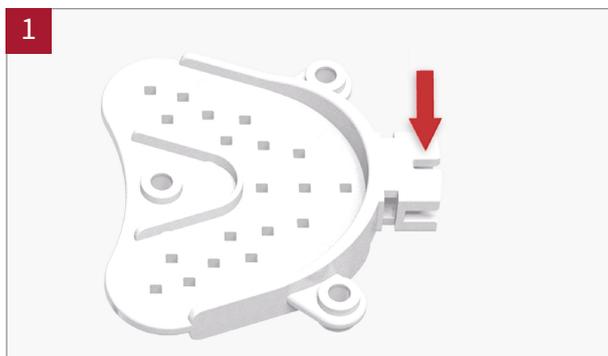

- Halten Sie den SICAT Fusion Bite immer **mit einer Nut nach oben**. Nur so kann dieser später mit einem SICAT Fusion Bite Adapter verbunden werden.



- Tragen Sie Bisregistrierungsmaterial auf die **obere Fläche** des SICAT Fusion Bites auf.



- Nehmen Sie den Biss im Oberkiefer des Patienten.



- Tragen Sie Bisregistrierungsmaterial auf die **untere Fläche** des SICAT Fusion Bites auf.



- Positionieren Sie den SICAT Fusion Bite im Oberkiefer und **nehmen Sie den Biss im Unterkiefer** indem Sie den Patienten zubeißen lassen.



- Entfernen Sie überschüssiges Material.

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE 0197

SUPPORT

TELEFON: +49 228 286206600

FAX: +49 228 286206971

E-MAIL: SUPPORT@SICAT.COM



DH71QUG003

STAND: 2021-02-16

SEITE: 2 / 2