

SICATJMT⁺




SICAT JMT⁺ - VORBEREITUNG DES T-ATTACHMENTS

Kurzanleitung | Deutsch

VORBEREITUNG DES T-ATTACHMENTS

Kurzanleitung

Um den Unterkiefersensor für die Aufnahme der individuellen Kieferbewegungen anbringen zu können, muss das T-Attachment an der vestibulären Fläche der Unterkieferzähne des Patienten befestigt werden:

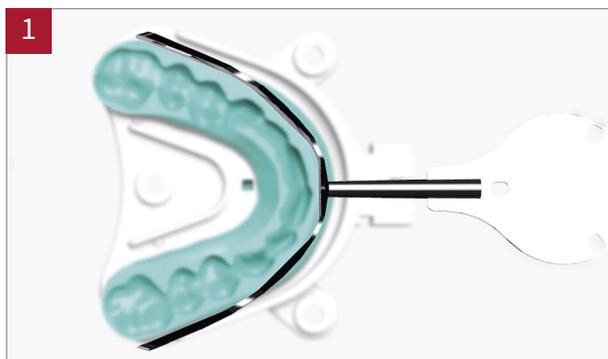

1

- Passen Sie das T-Attachment an den Unterkieferbogen des Patienten an.



2

- Überprüfen Sie die Form des T-Attachments im Patientenmund.



3

- Führen Sie den SICAT Fusion Bite in den Patientenmund ein, damit Sie die Höhe der Anbringung des T-Attachments bestimmen können. **Es dürfen keine Interferenzen zwischen SICAT Fusion Bite und T-Attachment zustande kommen.**
- Trocknen Sie die vestibuläre Zahnoberfläche der Unterkieferzähne.



4

- Bringen Sie flowable Composite an das T-Attachment an.



5

- Befestigen Sie das T-Attachment an den vestibulären Flächen der Unterkieferzähne.



6

- Nehmen Sie den SICAT Fusion Bite aus dem Patientenmund heraus.
- Kontrollieren Sie die Befestigung des T-Attachments.

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE 0197

SUPPORT

TELEFON: +49 228 286206600

FAX: +49 228 286206971

E-MAIL: SUPPORT@SICAT.COM



DH71QUG002

STAND: 2021-02-16

SEITE: 2 / 2