

SICAT ENDO *VERSIÓN 1.4*

Instrucciones de utilización | Español


COMPOSICIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Este documento contiene tres variantes distintas de las instrucciones de utilización de SICAT Endo:

- Una variante para SICAT Endo como módulo de SIDEXIS 4
- Una variante para SICAT Endo como plugin de SIDEXIS XG
- Una variante para SICAT Endo como versión independiente

Las distintas instrucciones de utilización contienen toda la información necesaria para la variante determinada. Si, por ejemplo, utiliza SICAT Endo exclusivamente como módulo de SIDEXIS 4, deberá leer tan solo la parte de las instrucciones de utilización correspondiente.

Las únicas excepciones son la explicación sobre las identificaciones y la parte trasera, con los datos sobre el fabricante y el servicio de asistencia y el número de artículo de las instrucciones de utilización. Encontrará estos datos al final del conjunto del documento.

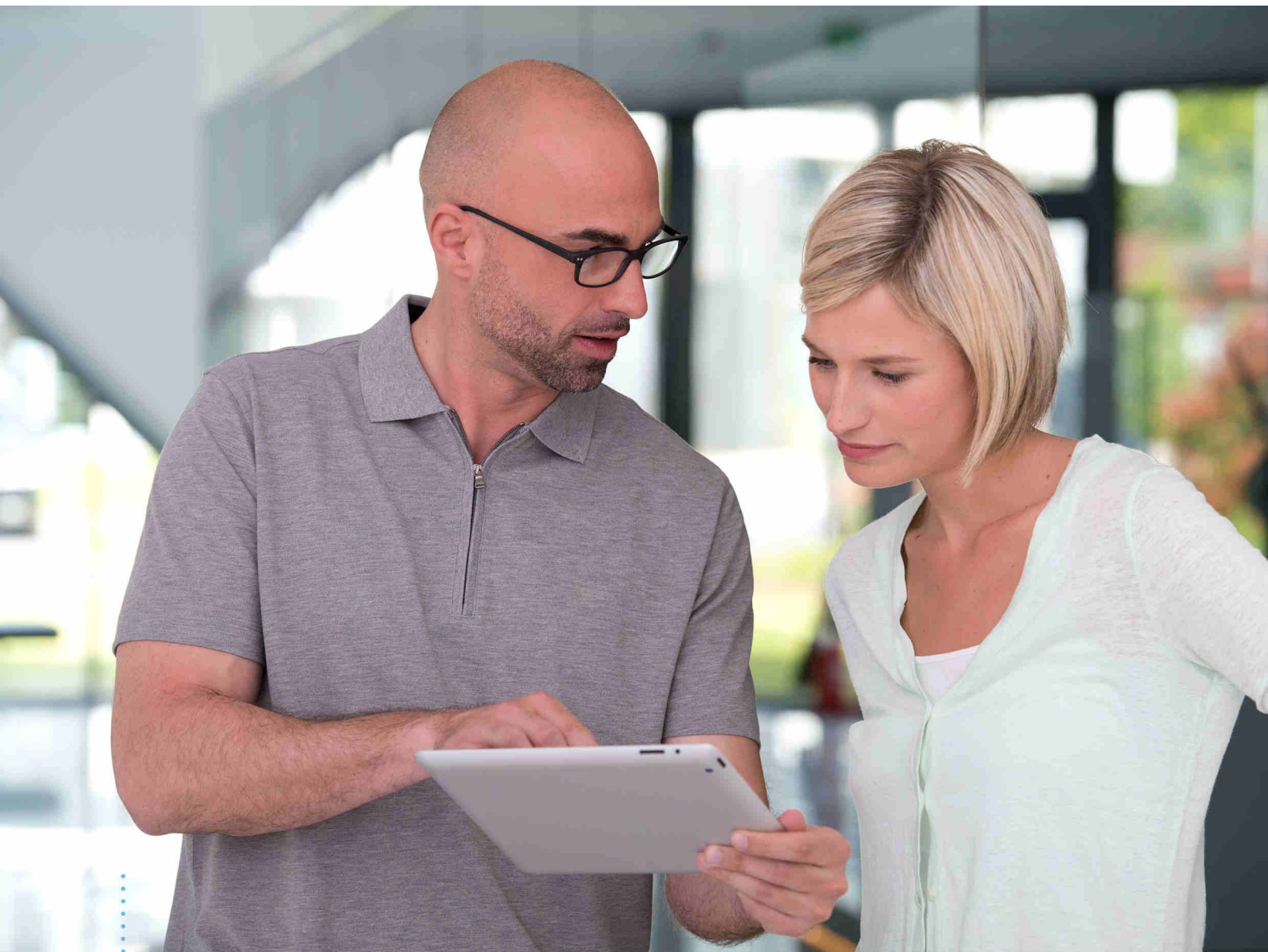

SICAT ENDO *VERSIÓN 1.4*

Instrucciones de utilización | Español | SIDEXIS 4

ÍNDICE - SIDEXIS 4

1	Usó previsto e indicaciones	8
2	Historial de versiones	9
3	Requisitos del sistema	10
4	Información de seguridad	12
4.1	Definición de los niveles de peligro	13
4.2	Cualificación de los usuarios	14
5	Símbolos y resaltes utilizados	15
6	Vista general de las instrucciones de utilización	16
7	Vista general de SICAT Suite	17
8	Instalar SICAT Suite	19
9	Llevar a cabo los pasos de la verificación tras la actualización del sistema operativo	25
10	Actualizar o reparar SICAT Suite	27
11	Particularidades de esta versión	28
12	Flujo de trabajo estándar de SICAT Endo	31
13	Registrar y eliminar SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4	35
14	Estudios de SICAT Endo en SIDEXIS 4	37
15	Iniciar SICAT Suite	39
16	La interfaz de usuario de SICAT Suite	41
17	Cambiar entre aplicaciones SICAT	42
18	Abrir las instrucciones de utilización	43
19	Licencias	44
19.1	Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"	46
19.2	Activar licencias mediante una conexión activa a Internet	47
19.3	Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet	49
19.4	Devolver licencias al pool de licencias	51
19.5	Canjear códigos	53
20	La interfaz de usuario de SICAT Endo	54
20.1	Barra de herramientas del flujo de trabajo	55
20.2	Barra de objetos	57
20.3	Gestionar objetos con el navegador de objetos	58
20.4	Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto	60
20.5	Objetos de SICAT Endo	61
21	Áreas de trabajo	65
21.1	Vista general del área de trabajo panorámica	66
21.2	Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral	68

21.3	Cambiar el área de trabajo activa	69
21.4	Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo	70
21.5	Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo	71
22	Vistas	72
22.1	Ajustar las vistas.....	73
22.2	Cambiar la vista activa.....	75
22.3	Maximizar y restablecer vistas	76
22.4	Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D	77
22.5	Ampliar vistas y desplazar secciones.....	79
22.6	Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D.....	80
22.7	Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos	81
22.8	Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración.....	82
22.9	Restablecer vistas	84
22.10	Realizar capturas de pantalla de vistas	85
23	Adaptar la vista 3D.....	86
23.1	Modificar la posición de la vista 3D.....	87
23.2	Cambiar el modo de visualización de la vista 3D	88
23.3	Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D.....	89
23.4	Cambiar el modo de detalle de la vista 3D	91
24	Alineación de volumen y área panorámica	92
24.1	Ajustar la alineación del volumen.....	95
24.2	Ajustar el área panorámica.....	100
25	Impresiones ópticas.....	103
25.1	Importar y registrar impresiones ópticas	104
25.2	Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL.....	110
25.3	Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT	111
26	Radiografías intraorales.....	113
26.1	Sensores de radiografías intraorales compatibles.....	115
26.2	Importar radiografías intraorales y asignar dientes	116
27	Asistente de registro	120
27.1	Posicionar previamente la radiografía intraoral	121
27.2	Registrar la radiografía intraoral.....	123
27.3	Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial	126
27.4	Poner máscaras en áreas.....	129
28	Asistente de EndoLine	131
28.1	Vistas en el asistente de EndoLine	132
28.1.1	EndoView	137
28.1.2	Girar EndoView	138
28.2	Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento.....	139
28.3	Orientar previamente la región dental	140
28.4	Colocar EndoLines	142

28.5	Ajustar color y texto	144
28.6	Añadir, desplazar y borrar puntos de control.....	145
28.7	Girar la vista 3D	148
28.8	Mostrar impresiones ópticas en la vista 3D	149
28.9	Utilizar botón del ratón	150
28.10	Planificar canales de perforación.....	151
29	Mediciones de distancias y ángulos	157
29.1	Añadir mediciones de distancias	158
29.2	Añadir mediciones de ángulos	159
29.3	Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas	161
30	Informar al paciente	163
30.1	Crear imágenes y capturas de pantalla	164
30.2	Preparar impresos	167
30.3	Generar impresos.....	169
31	Exportación de datos	170
32	Proceso de pedido	171
32.1	Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra.....	172
32.2	Abrir la cesta de la compra	176
32.3	Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido.....	177
32.4	Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet.....	178
32.5	Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT.....	179
32.6	SICAT WebConnector	180
32.7	Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet.....	182
33	Ajustes.....	186
33.1	Utilizar ajustes generales.....	187
33.2	Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE	189
33.3	Utilizar información de la consulta	191
33.4	Modificar los ajustes de visualización.....	192
34	Servicio de asistencia.....	194
34.1	Abrir opciones de asistencia.....	195
34.2	Información de contacto y herramientas de ayuda	196
34.3	Información	197
35	Abrir datos protegidos contra escritura	198
36	Cerrar SICAT Endo	200
37	Cerrar SICAT Suite	201
38	Métodos abreviados de teclado.....	202
39	Desinstalar SICAT Suite	203
40	Notas sobre seguridad	205
41	Precisión.....	212

Glosario	213
Índice alfabético.....	214

1 *USO PREVISTO E INDICACIONES*

SICAT Endo es un software para visualizar la información de imágenes del área oral-maxilofacial. La información de las imágenes procede de escáneres médicos como, por ejemplo, escáneres TC y TVD. Además, SICAT Endo ayuda al dentista a planificar, evaluar y comparar opciones terapéuticas y vías de acceso para tratamientos de endodoncia. Los datos de planificación generados por el dentista pueden exportarse desde SICAT Endo y utilizarse para llevar a cabo el tratamiento.

INDICACIONES

SICAT Endo es una aplicación de software para:

- Ayuda al diagnóstico en el área oral-maxilofacial
- Ayuda en la comparación de diferentes opciones terapéuticas
- Ayuda en la planificación del tratamiento de la endodoncia
- Ayuda a la planificación del tratamiento para plantillas de perforación endodónticas

2 HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN 1.4

- Versión inicial

3 REQUISITOS DEL SISTEMA



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

Procesador	Quad Core 2,3 GHz
Memoria de trabajo	8 GB
Tarjeta gráfica	Específica* DirectX 11 o superior 2 GB de memoria gráfica Controlador actual compatible como mínimo con WDDM 1.0
Pantalla	Resolución mínima de 1920 × 1080 píxeles con un escalado del 100 al 125%** Resolución máxima de 3840 × 2160 píxeles con un escalado del 100 al 200%
Memoria libre en el disco duro	20 GB y espacio adicional para juegos de datos
Medios de almacenamiento	Acceso a medio de almacenamiento externo que contiene los archivos de instalación.
Dispositivos de entrada	Teclado, ratón
Red	Ethernet, 100 Mbits/s, se recomiendan 1000 Mbits/s
Impresora para la hoja de información del paciente	300 dpi como mínimo Formato de papel DIN A4 o US Letter
Sistema operativo	Windows 7 SP1 (64 bits) con KB2670838 Windows 8 (64 bits, escritorio) Windows 8.1 (64 bits, escritorio) Windows 10 (64 bits, escritorio)
Navegador web	Microsoft Internet Explorer 11 o superior Mozilla Firefox 39 o superior Google Chrome 44 o superior JavaScript debe estar activado. Debe seleccionarse el navegador estándar.
Visor de PDF	Por ejemplo, Adobe Reader DC o superior
SIDEXIS XG con SICAT Suite como plugin	Versión 2.6.1 (64 bits)

SIDEXIS 4 con SICAT Suite como módulo	Versión 4.2 SiPlanAPI V4
SIDEXIS 4 con SICAT Suite como plugin	Versión 4.1.2 (64 bits)



*SICAT Suite solo es compatible con tarjetas gráficas dedicadas que tengan un rendimiento igual o superior a la NVIDIA GeForce 960 GTX. Las tarjetas gráficas integradas no son compatibles.

**La combinación de una baja resolución de pantalla y un alto nivel de escalado puede hacer que el software muestre de manera incompleta determinadas partes de la superficie.

La pantalla debe ajustarse de tal manera que muestre correctamente la imagen de prueba SMPTE. Encontrará más información al respecto en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [▶ *Página 189 - SIDEXIS 4*].

REQUISITOS DE SOFTWARE

SICAT Suite necesita los siguientes componentes de software y los instala si no están ya disponibles:

- Microsoft .NET Framework 4.5
- Software de administración de licencias CodeMeter 6.30d
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Los puertos deben estar autorizados en su cortafuegos:

PROTOCOLO	DIRECCIÓN DE LA CONEXIÓN	PUERTO
HTTP	Saliente	80
HTTPS	Saliente	443
FTPS - Dirección	Saliente	21
FTPS - Transferencia de datos	Saliente	49152-65534



Puede también realizar pedidos sin el SICAT WebConnector. Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 171 - SIDEXIS 4*].

4 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Es importante que lea los siguientes capítulos relativos a la seguridad:

- *Definición de los niveles de peligro* [▶ *Página 13 - SIDEXIS 4*]
- *Cualificación de los usuarios* [▶ *Página 14 - SIDEXIS 4*]
- *Notas sobre seguridad* [▶ *Página 205 - SIDEXIS 4*]

4.1 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO

En las presentes instrucciones de utilización se utilizan las siguientes identificaciones de seguridad para evitar lesiones de los usuarios o pacientes y daños materiales:



PRECAUCIÓN

Identifica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como consecuencia pequeñas lesiones.

NOTA

Identifica información que se considera importante, pero no relevante para la seguridad.

4.2 CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



PRECAUCIÓN

El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

Solo el personal con la formación apropiada o debidamente capacitado puede usar el software.

Si lleva a cabo una capacitación o un curso o usa este software en el marco de un curso general, podrá emplear el software solo bajo la supervisión permanente de una persona cualificada.

Para usar el software debe cumplir los siguientes requisitos:

- Haber leído las instrucciones de utilización.
- Estar familiarizado con la estructura básica y las funciones del software.
- Estar en condiciones de detectar fallos de funcionamiento del software y aplicar los pasos adecuados en caso necesario.

5 SÍMBOLOS Y RESALTES UTILIZADOS

SÍMBOLOS

Las presentes instrucciones de utilización emplean el siguiente símbolo:



El símbolo de nota identifica información adicional como, por ejemplo, formas de proceder alternativas.

RESALTES

Los textos y las denominaciones de elementos que presenta SICAT Suite aparecen destacados con fuente **negrita**. Esto incluye los siguientes objetos en la interfaz de usuario:

- Denominaciones de áreas
- Denominaciones de botones
- Denominaciones de símbolos
- Textos de notas y mensajes en la pantalla

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Las instrucciones de operación aparecen en forma de listas numeradas:

- ☑ Los requisitos se identifican con este símbolo.
- 1. Los pasos se identifican con números.
 - ▶ Los resultados intermedios se identifican con este símbolo y están sangrados.
- 2. Después de los resultados intermedios hay más pasos.
 - ▶ Los resultados finales se identifican con este símbolo.
 - Una instrucción que solo consta de un paso se identifica con este símbolo.

6 VISTA GENERAL DE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

SICAT Endo forma parte de SICAT Suite junto con otras aplicaciones.

SICAT Suite es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones SICAT. Por consiguiente, las aplicaciones se instalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 19 - SIDEXIS 4*].

Actualmente SICAT Suite está disponible en tres variantes. Algunas operaciones de manejo son diferentes en función de la variante. Por eso las presentes instrucciones de utilización tratan las variantes de forma separada:

- Módulo de SIDEXIS 4
- Plugin de SIDEXIS XG
- Versión independiente

No es necesario que elija una variante cuando instale SICAT Suite.

Las aplicaciones también se desinstalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Desinstalar SICAT Suite* [▶ *Página 203 - SIDEXIS 4*].

7 VISTA GENERAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

- SICAT Function: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Function en las Instrucciones de utilización de SICAT Function.
- SICAT Air: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Air en las Instrucciones de utilización de SICAT Air.
- SICAT Endo: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Endo en las Instrucciones de utilización de SICAT Endo.

IDIOMAS

SICAT Suite es compatible con los siguientes idiomas en la interfaz de usuario:

- Inglés
- Alemán
- Francés
- Japonés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Portugués
- Ruso

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Para activar una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en PC en los que esté instalado SICAT Suite.

VERSIÓN COMPLETA Y MODO VIEWER

SICAT Suite puede iniciarse en dos modos diferentes:

- Si ha activado la licencia del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en el modo Viewer.
- Si ha activado la licencia completa del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en su versión completa.

En general, se aplica lo siguiente:

- Las aplicaciones con licencia completa activada se inician en su versión completa.
- Las aplicaciones con la licencia del Viewer activada se inician en el modo Viewer.
- Las aplicaciones sin licencia activada no se inician.
- No es necesario que elija un modo cuando instale SICAT Suite.

8 INSTALAR SICAT SUITE

 **PRECAUCIÓN**

Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.

 **PRECAUCIÓN**

Los medios de instalación dañados podrían hacer que la instalación fallara.

Trate los medios de instalación con cuidado y almacénelos de forma adecuada.

 **PRECAUCIÓN**

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

 **PRECAUCIÓN**

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.



La función **Autoarranque** de Windows podría estar desconectada en su PC. En ese caso, puede abrir el medio óptico en el explorador de archivos de Windows e iniciar manualmente el archivo **SICATSuiteSetup.exe**, que contiene en su nombre la versión de SICAT Suite.

Para instalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

Su PC cumple los requisitos del sistema. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 10 - SIDEXIS 4*].

1. Introduzca el medio de instalación de SICAT Suite en la unidad de disco óptica de su PC.

▶ Se abre la ventana **Autoarranque**.

2. En la ventana **Autoarranque**, seleccione la opción **Ejecutar SICATSuiteSetup.exe**, que contiene en su nombre la versión de SICAT Suite.

▶ Los requisitos de software se instalan si no están ya disponibles en el PC.



- El programa de instalación de SICAT Suite se inicia y la ventana **INTRODUCCIÓN** se abre:



3. Seleccione el idioma que desee para el programa de instalación de SICAT Suite en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **ACUERDO DE LICENCIA**:




4. Lea el contrato de licencia de usuario final en su totalidad, seleccione la casilla de comprobación **Acepto el acuerdo de licencia** y haga clic en **Continuar**.

► Se abre la ventana **OPCIONES**:



5. Para cambiar la carpeta del disco duro donde el programa de instalación de SICAT Suite instala SICAT Suite, haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.
6. Navegue hasta la carpeta deseada en la que el programa de instalación de SICAT Suite tenga que crear el directorio «SICAT Suite» y haga clic en **OK**.
 - El programa de instalación de SICAT Suite inserta la ruta de la carpeta seleccionada en el campo **¿Dónde desea instalar el software**.
7. Si SIDEXIS XG o SIDEXIS 4 está instalado en su PC, la casilla de comprobación **Deseo utilizar SICAT Suite con SIDEXIS** está disponible. Durante la instalación o más adelante, SICAT Suite puede registrarse manualmente como plugin de SIDEXIS XG o como módulo de SIDEXIS 4.
 - Si la casilla de comprobación **Deseo utilizar SICAT Suite con SIDEXIS** está activada, la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio** no está disponible.
8. Si está disponible, active o desactive la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio**.
9. Haga clic en el botón **Instalar**.

- ▶ Se abre la ventana **PROGRESO**:

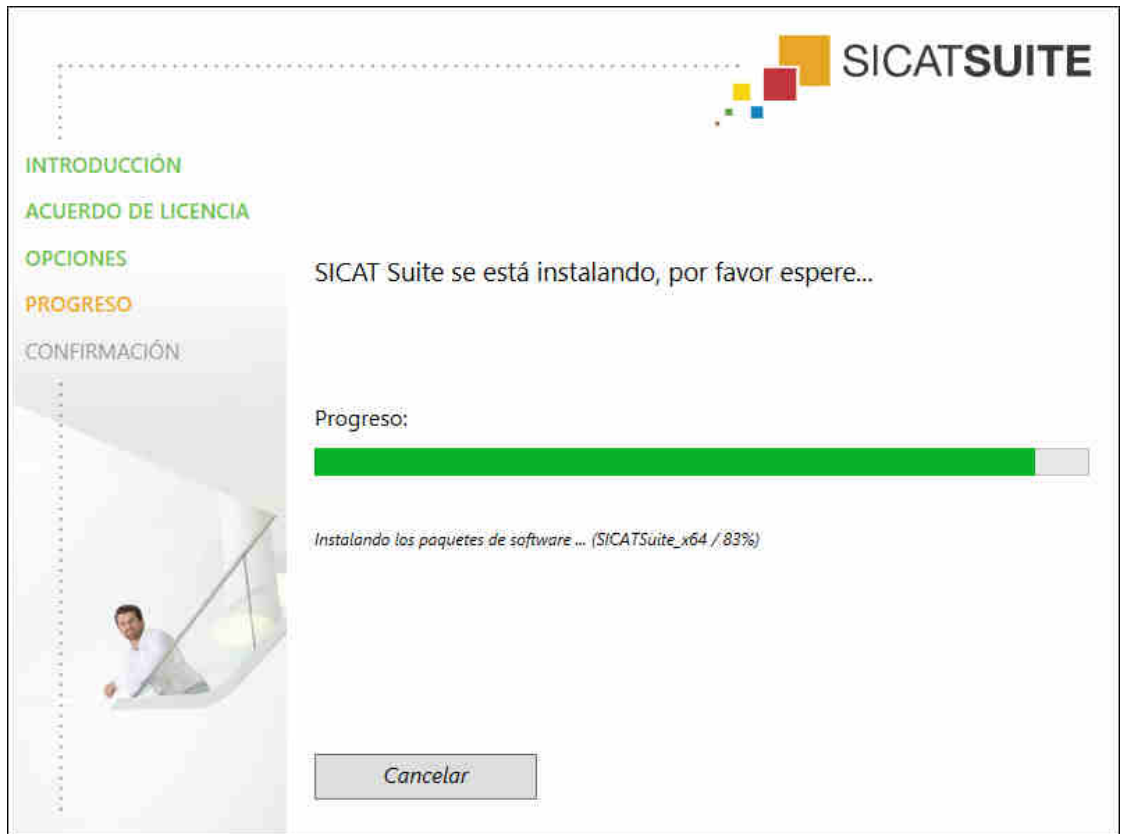

- ▶ Se instalan SICAT Suite y los requisitos de software restantes.
- ▶ Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**:



10. Haga clic en el botón **Finalizar**.

▶ El programa de instalación de SICAT Suite se cierra.

9 LLEVAR A CABO LOS PASOS DE LA VERIFICACIÓN TRAS LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO


PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones, deberá asegurar que SICAT Endo funcione sin problemas. Lleve a cabo los siguientes pasos de la verificación. Si detecta diferencias en un paso de la verificación, impida el que se siga usando SICAT Endo en el PC afectado y póngase en contacto con la asistencia SICAT.


PREPARATIVOS

1. Parar asegurar que nadie haya realizado cambios de forma accidental, elimine el paciente «Patient Axx».
2. Importe el juego de datos de referencia del archivo «SICATSuite_ReferenceDataset_1.4.zip». Encontrará el juego de datos en el medio de instalación de SICAT Suite.
3. Abra el juego de datos de referencia «Patient Axx» en SICAT Endo.

ENDOLINE

1. Asegúrese de que el odontograma **FDI** esté activo. Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 187 - SIDEXIS 4*].
2. Asegúrese de que el área de trabajo **Panorámica** esté activa.
3. Restablezca las vistas a los valores estándar.
4. En el **Navegador de objetos**, abra el grupo «**Diente 45**».
5. En el **Navegador de objetos**, seleccione el elemento «15,24 mm n.º diente 45» y enfóquelo.

6. Compare la vista **Longitudinal** con la siguiente captura de pantalla:

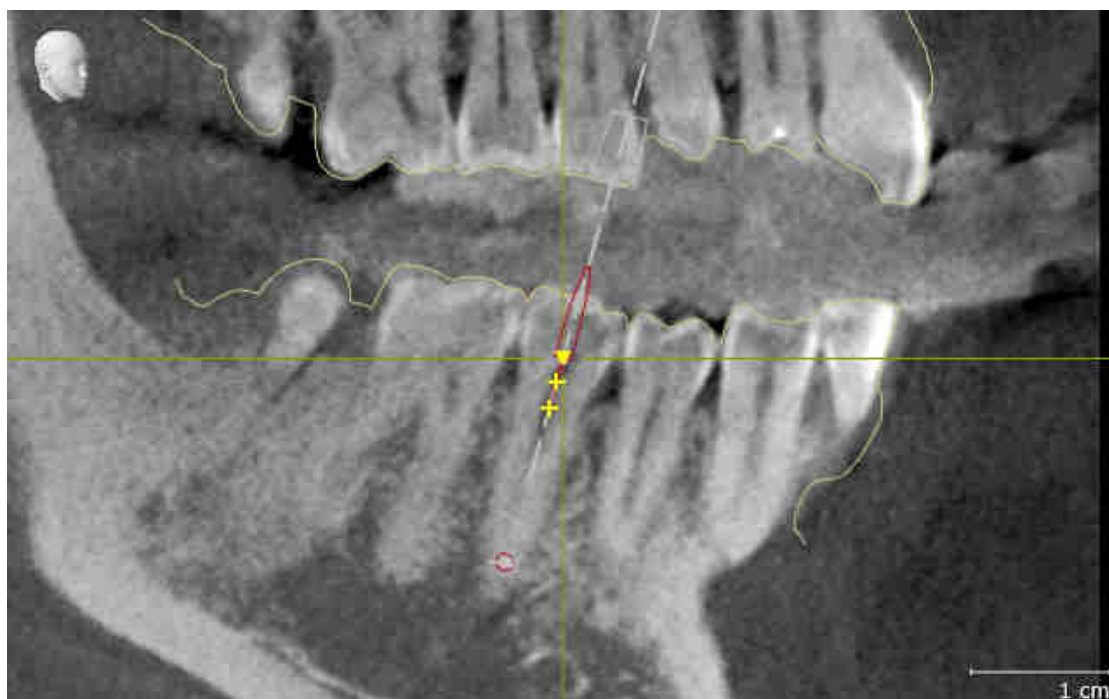

7. En el **Navegador de objetos**, abra el grupo «**Diente 25**».
8. En el **Navegador de objetos**, seleccione el elemento «13,63 mm n.º diente 25» y enfóquelo.
9. Compare la vista **Transversal** con la siguiente captura de pantalla:



10 ACTUALIZAR O REPARAR SICAT SUITE

ACTUALIZAR SICAT SUITE

Puede actualizar SICAT Suite iniciando el programa de instalación de SICAT Suite y haciendo clic en el botón **Actualizar**. El programa de instalación desinstala primero la versión antigua de SICAT Suite. Todos los datos y los ajustes se conservan.



Una nueva versión de la versión independiente de SICAT Suite necesita archivadores de historias clínicas actualizados. Al iniciar por primera vez la nueva versión o activar un archivador de historias clínicas obsoleto, SICAT Suite pregunta al usuario si desea actualizar el archivador. Si se confirma el mensaje, SICAT Suite actualiza automáticamente el archivador de historias clínicas. **¡PRECAUCIÓN! Los archivadores de historias clínicas actualizados ya no pueden utilizarse con versiones antiguas de SICAT Suite.**



Si SIDEXIS XG se actualiza a SIDEXIS 4.1.3 o superior y después se actualiza SICAT Suite, el instalador de SICAT Suite registra SICAT Suite como módulo SIDEXIS 4. Cuando se abre una radiografía 3D, SICAT Suite comprueba si en SIDEXIS XG hay estudios sobre esa radiografía 3D y los traslada de SIDEXIS XG a SIDEXIS 4.

REPARAR SICAT SUITE

Puede reparar SICAT Suite iniciando el programa de instalación de SICAT Suite y haciendo clic en el botón **Reparar**. Todos los datos y los ajustes se conservan.

Tanto la actualización como la reparación de SICAT Suite utilizan el programa de instalación de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 19 - SIDEXIS 4*].

EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN DE PLUGIN A MÓDULO EN SIDEXIS 4

SICAT Suite a partir de la versión 1.3 es compatible con SIDEXIS 4 a partir de la versión 4.1.3 como módulo, pero ya no como plugin. Si se instala la actualización en SICAT Suite 1.3 después de SIDEXIS 4, el registro como módulo se lleva a cabo automáticamente. Si SIDEXIS 4 se actualiza después de actualizar SICAT Suite, el registro debe llevarse a cabo manualmente. Encontrará más información al respecto en *Registrar y eliminar SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4* [▶ *Página 35 - SIDEXIS 4*].

11 PARTICULARIDADES DE ESTA VERSIÓN

Dependiendo de si utiliza SICAT Endo de forma independiente o conectado a otro software, existen diferencias en algunas áreas.

REGISTRO MANUAL COMO MÓDULO DE SIDEXIS 4

Además de la integración automática durante la instalación, SICAT Suite puede registrarse y eliminarse manualmente como módulo de SIDEXIS 4. Encontrará información sobre ello en *Registrar y eliminar SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4* [▶ *Página 35 - SIDEXIS 4*].

INICIO DE PROGRAMA

Como módulo de SIDEXIS 4, SICAT Suite se inicia dentro de SIDEXIS 4 en la fase **Plan & Treat**. En *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 39 - SIDEXIS 4*] encontrará información sobre cómo iniciar SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4.

DATOS DE PACIENTE Y DATOS DE VOLUMEN

La versión de SICAT Endo conectada a SIDEXIS utiliza los datos de paciente y los datos de volumen de SIDEXIS. Por ello, los datos se guardan mediante los procedimientos previstos para SIDEXIS.



Además de los datos de paciente, también deben guardarse los parámetros de usuario de las aplicaciones SICAT. Los parámetros definidos por cada usuario se encuentran en dos directorios independientes. Para abrir estos directorios, introduzca `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` y `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` en la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows.

AJUSTES

Los ajustes de SICAT Suite son una categoría dentro de los ajustes de SIDEXIS 4.

En la versión integrada en SIDEXIS, SICAT Suite solo muestra los valores de algunos ajustes, ya que los adopta de SIDEXIS.

LICENCIAS

La versión independiente y las versiones de SICAT Suite integradas en otro software utilizan las mismas licencias. No es necesario que elija una versión cuando instale SICAT Suite.

SINCRONIZACIÓN DE DATOS ENTRE SICAT ENDO Y SIDEXIS 4

SICAT Endo y SIDEXIS 4 sincronizan la alineación de volumen y el área panorámica en ambos sentidos. A este respecto, se aplican las siguientes limitaciones:

- SICAT Endo solo permite rotaciones de la alineación de volumen de hasta 30 grados.
- Si la sincronización de la alineación de volumen influye en objetos de diagnóstico u objetos planificados ya añadidos que estén basados en otra alineación de volumen, SICAT Endo abre una ventana de notificación. La ventana de notificación informa sobre las repercusiones exactas de la sincronización y permite elegir entre las siguientes opciones:
 - **Sincronizar**
 - **Ahora no**
 - **Nunca** para la radiografía 3D actual y la alineación de volumen actual en SIDEXIS 4
- Si la sincronización del área panorámica influye en objetos de diagnóstico u objetos planificados ya añadidos que estén basados en otra área panorámica ajustada, SICAT Endo abre una ventana de notificación. En la ventana de notificación puede elegir entre dos opciones:
 - **OK** - SICAT Endo lleva a cabo la sincronización y elimina los objetos.
 - **Cancelar** - SICAT Endo no lleva a cabo la sincronización y mantiene los objetos.
- SICAT Endo solo permite las curvas panorámicas estándar de SIDEXIS 4, no el desplazamiento de puntos individuales.
- SICAT Endo solo permite grosores de curva panorámica de al menos 10 mm.
- SICAT Endo solo permite curvas panorámicas que no se hayan rotado en SIDEXIS 4.

Cuando se da al menos una de estas limitaciones, SICAT Endo y SIDEXIS 4 dejan de sincronizar la alineación de volumen y el área panorámica o únicamente el área panorámica.

Asimismo, SICAT Endo adopta el punto de enfoque y la posición de la vista **3D** de SIDEXIS 4 cuando se abre por primera vez una radiografía 3D en SICAT Endo.

EXPORTACIÓN DE DATOS

Cuando SICAT Suite funciona como módulo SIDEXIS 4, la exportación de datos se lleva a cabo a través de las funciones correspondientes de SIDEXIS 4. Encontrará más información al respecto en las Instrucciones de utilización de SIDEXIS 4.

AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA A LA EDICIÓN DE SIDEXIS 4

Es posible añadir capturas de vistas y áreas de trabajo a la edición de SIDEXIS 4. A continuación se pueden utilizar las posibilidades de salida 2D de SIDEXIS 4. Encontrará más información al respecto en las Instrucciones de utilización de SIDEXIS 4.

CESTA DE LA COMPRA

La cesta de la compra se encuentra en SICAT Suite y en la fase **Edición** de SIDEXIS 4.

ABRIR ESTUDIOS CON Y SIN DERECHOS DE ESCRITURA



Si el PC en el que funcionan SIDEXIS 4 y SICAT Suite se encuentra en un entorno de red y tanto SIDEXIS 4 como la configuración de red lo permiten, SIDEXIS 4 podría formar parte de una instalación de multiestación de trabajo. Esto puede tener como consecuencia, entre otras cosas, que otras estaciones de trabajo le quiten los derechos de escritura para juegos de datos abiertos. En tal caso, SIDEXIS 4 cierra inmediatamente el juego de datos y los cambios en los estudios SICAT Endo ya no pueden guardarse.

Para poder realizar y guardar cambios en estudios SICAT Endo, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe estar activada una licencia completa de SICAT Endo.

La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles en cada caso:

FUNCIÓN	LICENCIA COMPLETA ACTIVADA	LICENCIA DEL VIEWER ACTIVADA	NO HAY LICENCIA ACTIVADA
Área de servicio de asistencia	Sí	Sí	Sí
Ajustes generales	Sí	Sí	Sí
Realizar cambios	Sí	No	No
Ver datos sin guardar cambios	No	Sí	No
Ayuda	Sí	Sí	Sí

En los siguientes casos, puede ver estudios de SICAT Endo también sin licencia del Viewer:

- Exporte estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4 e importe los datos en SIDEXIS en otro PC. SICAT Endo debe estar instalado en este PC.
- Cree un paquete Wrap&Go que contenga estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4. Instale el paquete Wrap&Go en otro PC. Después, instale SICAT Endo.

En ambos casos, no podrá realizar o guardar cambios en la planificación.

En determinadas circunstancias no es posible realizar ni guardar cambios de estudios SICAT Endo aun estando activada una licencia de aplicación. La causa puede ser, por ejemplo, un proceso de pedido en curso.

Encontrará más información en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ [Página 198 - SIDEXIS 4](#)].

12 FLUJO DE TRABAJO ESTÁNDAR DE SICAT ENDO


PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.


PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.


PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.


PRECAUCIÓN

Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.


PRECAUCIÓN

Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.


PRECAUCIÓN

Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.



Antes de empezar a trabajar con SICAT Suite, es importante que haya leído la totalidad de las presentes instrucciones de utilización y, en especial, todas las notas sobre seguridad. Tenga las presentes las instrucciones de utilización a mano para futuras búsquedas de información.

INSTALACIÓN

Encontrará la manera de instalar SICAT Suite en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 19 - SIDEXIS 4*].

En *Registrar y eliminar SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4* [▶ *Página 35 - SIDEXIS 4*] encontrará información sobre cómo registrar SICAT Suite manualmente como módulo de SIDEXIS 4.

HABILITAR VERSIÓN COMPLETA

- Si ha adquirido una licencia para SICAT Endo, active la licencia para habilitar la versión completa. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 44 - SIDEXIS 4*].



Si no ha adquirido ninguna licencia para SICAT Endo, abra una única radiografía 3D en el modo Viewer. Encontrará más información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 198 - SIDEXIS 4*].

AJUSTES

Modifique los ajustes deseados en el área **Ajustes**. Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 186 - SIDEXIS 4*].

JUEGOS DE DATOS

SICAT Endo Combina tres tipos de archivos diferentes entre sí.

- Radiografías 3D, por ejemplo de Sirona GALILEOS
- Radiografías intraorales, por ejemplo de Sirona XIOS XG
- impresiones ópticas digitales, por ejemplo de Sirona CEREC.


CAPTURAR JUEGOS DE DATOS

1. Elabore una radiografía intraoral del paciente en caso necesario. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.
2. Elabore una radiografía 3D del paciente. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.
3. Efectúe impresiones ópticas digitales del maxilar o de la mandíbula. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.

ABRA UN JUEGO DE DATOS

1. Seleccione una radiografía 3D o un estudio SICAT Endo en la línea de tiempo.
2. Inicie SICAT Endo. Encontrará información sobre ello en *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 39 - SIDEXIS 4*].

TÍPICO FLUJO DE TRABAJO DE LA ENDODONCIA DIGITAL

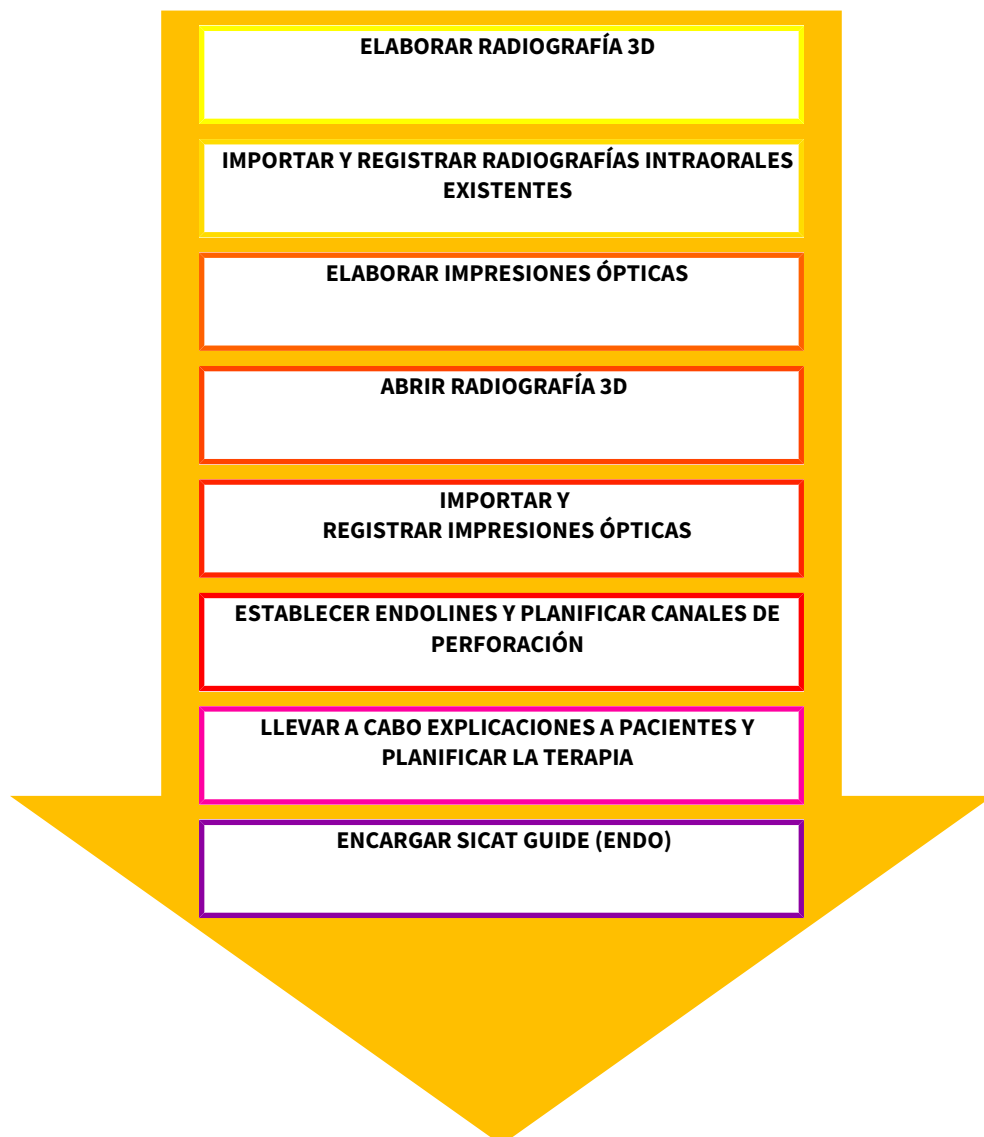

PASOS DE TRABAJO EN SICAT ENDO

1. Si es necesario, adapte la alineación del volumen y el área panorámica. Encontrará información sobre ello en *Alineación de volumen y área panorámica* [▶ Página 92 - SIDEXIS 4].
2. Importe y registre las radiografías intraorales existentes en SICAT Endo. Encontrará información al respecto en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ Página 116 - SIDEXIS 4] y *Registrar la radiografía intraoral* [▶ Página 123 - SIDEXIS 4].
3. Importe y registre las impresiones ópticas con los datos de la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ Página 104 - SIDEXIS 4].
4. Coloque EndoLines y planifique canales de perforación. Encontrará información al respecto en *Orientar previamente la región dental* [▶ Página 140 - SIDEXIS 4], *Colocar EndoLines* [▶ Página 142 - SIDEXIS 4] y *Planificar canales de perforación* [▶ Página 151 - SIDEXIS 4].

5. Evalúe los objetos planificados Endo en el área de trabajo **Radiografía intraoral**. Encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral* [▶ *Página 68 - SIDEXIS 4*].
6. Cree un impreso e informe al paciente. Encontrará información sobre ello en *Informar al paciente* [▶ *Página 163 - SIDEXIS 4*].
7. Solicite una plantilla de perforación SICAT GUIDE (ENDO). Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 171 - SIDEXIS 4*].
8. Exporte datos, por ejemplo, para pedir una segunda opinión. Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 170 - SIDEXIS 4*].

TERMINAR O INTERRUMPIR EL TRABAJO CON EL JUEGO DE DATOS

- Para terminar o interrumpir su trabajo, guárdelo cerrando SICAT Suite dentro de SIDEXIS 4. Encontrará información sobre ello en *Cerrar SICAT Suite* [▶ *Página 201 - SIDEXIS 4*].

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA

Las instrucciones de utilización se encuentran en la ventana **Ayuda SICAT Suite**. Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 43 - SIDEXIS 4*].

Encontrará más temas de ayuda en el área **Servicio de asistencia**. Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 194 - SIDEXIS 4*].

13 REGISTRAR Y ELIMINAR SICAT SUITE COMO MÓDULO DE SIDEXIS 4

Encontrará información general sobre el uso de SICAT Suite con SIDEXIS 4 en Particularidades de esta versión.



Si se instala SICAT Suite después de SIDEXIS 4, el programa de instalación de SICAT Suite registra el software automáticamente como módulo SIDEXIS 4. Encontrará más información al respecto en *Instalar SICAT Suite* [▶ [Página 19 - SIDEXIS 4](#)].

ABRIR LA VENTANA SIDEXIS 4


1. Inicie la versión independiente de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Iniciar SICAT Suite* [▶ [Página 39 - SIDEXIS 4](#)].



2. Haga clic en el símbolo **Ajustes**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



3. Haga clic en la pestaña **SIDEXIS 4**.
▶ Se abre la ventana **SIDEXIS 4**:

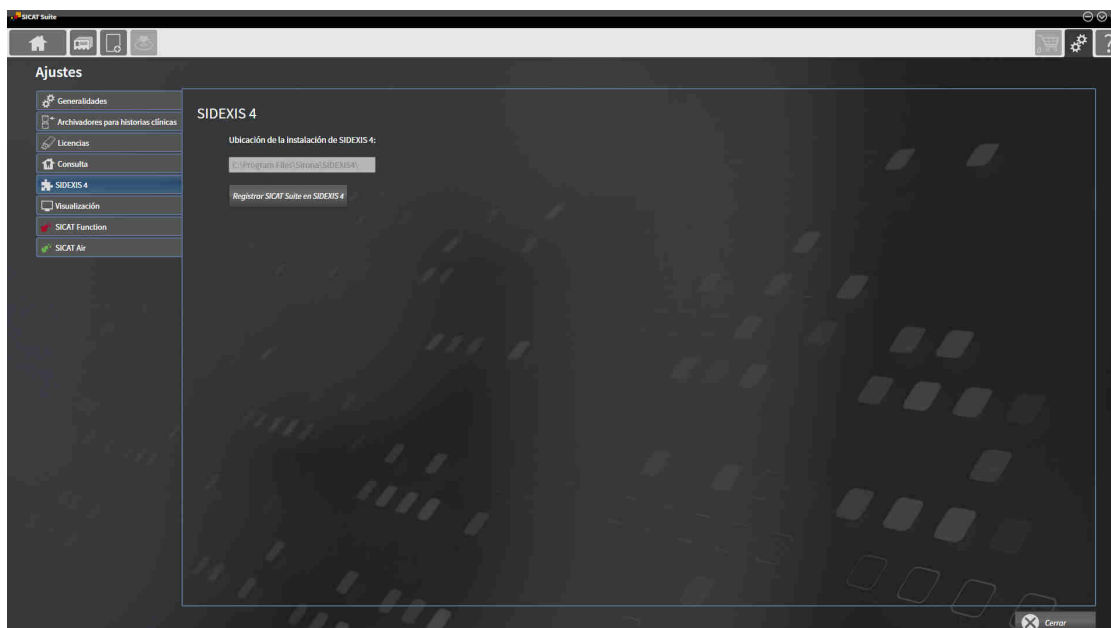


REGISTRAR SICAT SUITE COMO MÓDULO DE SIDEXIS 4

- SICAT Suite ya se ha instalado correctamente. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 19 - SIDEXIS 4*].
- SIDEXIS 4 no está abierto.
- La versión independiente de SICAT Suite ya se ha iniciado.
- La ventana **SIDEXIS 4** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Registrar SICAT Suite en SIDEXIS 4**.

2. Inicie SIDEXIS 4.

- ▶ SICAT Suite está registrado como módulo de SIDEXIS 4. Si la fase **Plan & Treat** puede verse, significa que el registro en SIDEXIS 4 se ha llevado a cabo correctamente.

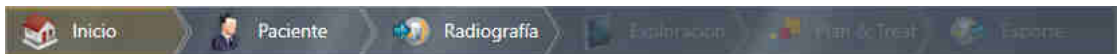

ELIMINAR SICAT SUITE COMO MÓDULO DE SIDEXIS 4

- SICAT Suite ya está registrado como módulo de SIDEXIS 4.
- SIDEXIS 4 no está abierto.
- La versión independiente de SICAT Suite ya se ha iniciado.
- La ventana **SIDEXIS 4** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Eliminar SICAT Suite de SIDEXIS 4**.

2. Inicie SIDEXIS 4.

- ▶ SICAT Suite ya no está disponible como módulo de SIDEXIS 4.

14 ESTUDIOS DE SICAT ENDO EN SIDEXIS 4



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.



PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN


Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.

Cuando SICAT Suite funciona como módulo SIDEXIS4, la administración de los datos del paciente se lleva a cabo en SIDEXIS4.

SIDEXIS4 muestra imágenes de vista previa de estudios de SICAT Endo si se cumplen las siguientes condiciones:

- Está utilizando SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4.
- Existe un estudio de SICAT Endo para el paciente seleccionado.

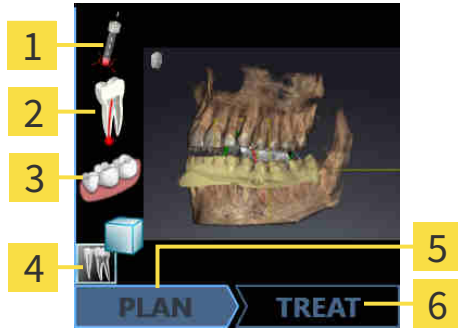

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Canales de perforación | 4 Radiografías intraorales |
| 2 EndoLines | 5 Planificación |
| 3 Impresiones ópticas | 6 Pedido |

Las imágenes de vista previa muestran la siguiente información:

- Disponibilidad de las radiografías intraorales registradas
- Disponibilidad de impresiones ópticas
- Disponibilidad de una planificación para el tratamiento del canal de la raíz
- Disponibilidad de un pedido con estado y fecha.
- Disponibilidad de un informe

Si los símbolos aparecen más brillantes, significa que el elemento correspondiente está en un estudio.

15 INICIAR SICAT SUITE

 **PRECAUCIÓN**

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.

 **PRECAUCIÓN**

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.

 **PRECAUCIÓN**

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.

Para iniciar SICAT Endo, en primer lugar debe iniciar SICAT Suite.

Para iniciar SICAT Suite como módulo SIDEXIS 4, haga lo siguiente:

- SICAT Suite ya se ha instalado correctamente. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [► *Página 19 - SIDEXIS 4*].
- SICAT Suite ya está registrado como módulo de SIDEXIS 4. Encontrará información sobre ello en *Registrar y eliminar SICAT Suite como módulo de SIDEXIS 4* [► *Página 35 - SIDEXIS 4*]. Si SICAT Suite se instala después de SIDEXIS 4, el registro puede llevarse a cabo automáticamente.
- Ya ha seleccionado una radiografía 3D o un estudio en SIDEXIS 4.
- De manera opcional, ha seleccionado otros juegos de datos en SIDEXIS 4. Puede tratarse siempre de una radiografía intraoral. En el caso de una radiografía 3D, puede tratarse además de un estudio al respecto.



1. Haga clic en el símbolo **Mostrar en** situado a la derecha del botón **Mostrar en exploración 3D**.



2. En la ventana **Mostrar en**, haga clic en el símbolo **SICAT Suite**.


- ▶ SIDEXIS 4 cambia a la fase **Plan & Treat**.
- ▶ SICAT Suite abre la radiografía 3D en una aplicación SICAT.



Si se abre una radiografía 3D sin estudio correspondiente y solamente se ha activado la licencia de una aplicación SICAT, se inicia dicha aplicación SICAT. Si se abre una radiografía 3D con varios estudios correspondientes y se han activado las licencias de varias aplicaciones SICAT, se inicia la aplicación cuyo estudio se haya modificado en último lugar.

Después de abrir una radiografía 3D se puede cambiar a otra aplicación SICAT. Encontrará información sobre ello en *Cambiar entre aplicaciones SICAT* [► *Página 42 - SIDEXIS 4*].


Si se ha guardado un estudio específico de una aplicación, dicho estudio puede seleccionarse directamente en la ventana **Impresiones ópticas** y abrirse en la aplicación SICAT correspondiente. Si en la cesta de la compra ya se ha colocado un artículo basado en este estudio, se abre la cesta de la compra.

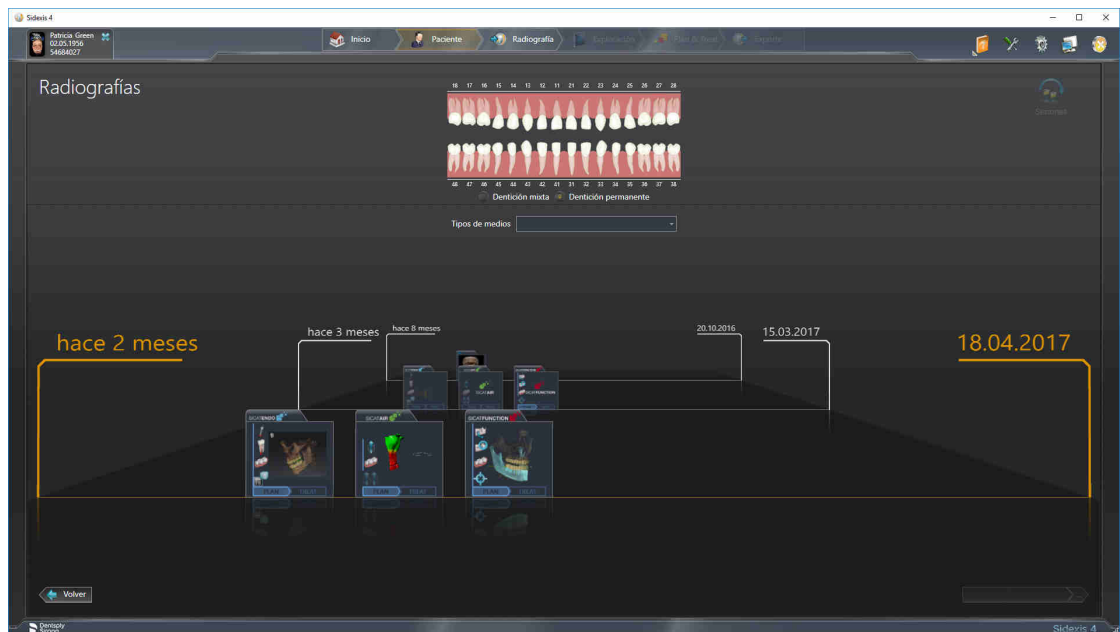

SIDEXIS 4 también muestra los estudios en la ventana **Detalles de paciente**, en el área **Últimas radiografías**. Encontrará información sobre ello en *Estudios de SICAT Endo en SIDEXIS 4* [► [Página 37 - SIDEXIS 4](#)].

16 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT SUITE

La interfaz de usuario de SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

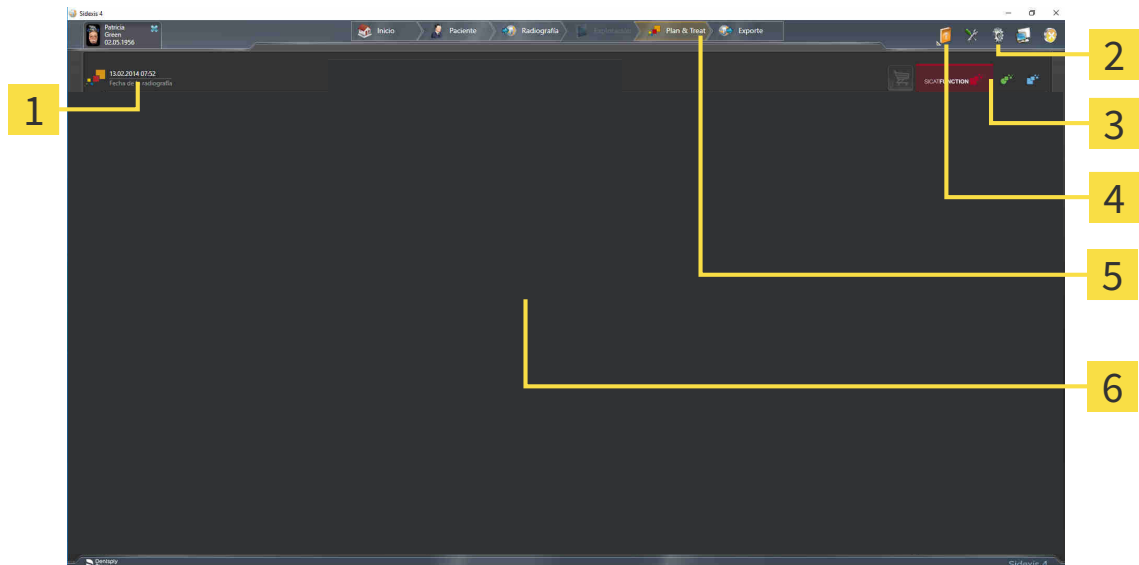

1 Estudio abierto actualmente

2 Ajustes

3 Botones para cambiar de aplicación y botón **Cesta de la compra**

4 Ayuda

5 Barra de fases de SIDEXIS 4

6 Área de aplicaciones

- Estudio abierto actualmente: aquí encontrará información sobre el estudio abierto actualmente y un botón para cerrar SICAT Suite.
- **Ajustes** - Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 186 - SIDEXIS 4*].
- Botones para cambiar de aplicación y botón **Cesta de la compra** - Encontrará más información al respecto en *Cambiar entre aplicaciones SICAT* [▶ *Página 42 - SIDEXIS 4*] y en *Proceso de pedido* [▶ *Página 171 - SIDEXIS 4*].
- **Ayuda** - Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 43 - SIDEXIS 4*].
- El **Área de aplicaciones** que se encuentra en la parte restante de SICAT Suite muestra la interfaz de usuario de la aplicación SICAT activa.

17 CAMBIAR ENTRE APLICACIONES SICAT

Para cambiar entre distintas aplicaciones de SICAT, haga lo siguiente:




- Haga clic en el botón que tenga el nombre de la aplicación SICAT deseada.
- ▶ SICAT Suite cambia a la aplicación seleccionada.

18 ABRIR LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

El menú **Ayuda** de SIDEXIS 4 contiene las instrucciones de utilización de las aplicaciones SICAT en formato PDF. Para abrir las instrucciones de utilización de una aplicación SICAT, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el símbolo **Ayuda**.
 - ▶ Se abre una lista con las instrucciones de utilización:

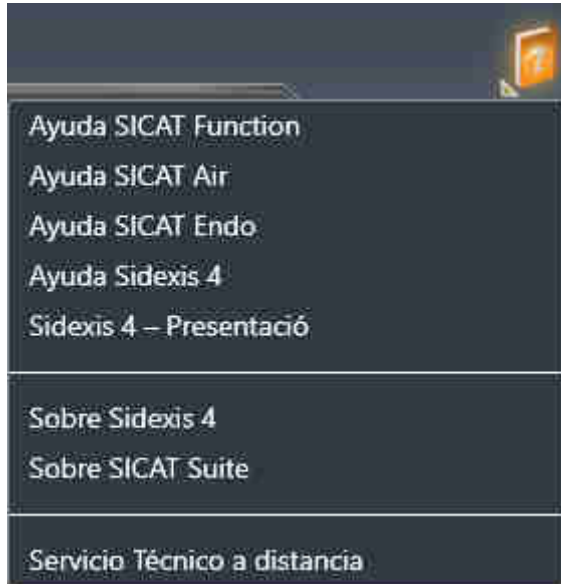

2. Haga clic en las instrucciones de utilización deseadas.
 - ▶ Se abren las instrucciones de utilización seleccionadas.

Si hay una aplicación de SICAT abierta, también puede pulsar la tecla F1 para abrir la ayuda correspondiente.

19 LICENCIAS

SICAT Suite muestra únicamente las aplicaciones de SICAT para las que ha activado una licencia.



En la versión de SICAT Suite conectada a SIDEXIS, puede ver planificaciones de SICAT Endo también sin una licencia de SICAT Endo activada.

Existen las siguientes clases de licencias:

- Una licencia del Viewer, con la que se puede utilizar una aplicación durante un tiempo ilimitado en el modo Viewer.
- Una licencia de demostración, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo limitado.
- Una licencia completa, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo ilimitado.

Para activar una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en PC en los que esté instalado SICAT Suite.

Para activar y desactivar licencias, se aplica lo siguiente:

- Se reciben únicamente claves de licencias de aplicaciones de SICAT autorizadas en su país.
- Si activa una clave de activación en un PC, se conectará al PC una licencia de las aplicaciones de SICAT o funciones contenidas. Las licencias no están disponibles para la activación en otro PC.
- Puede desactivar las licencias de forma independiente para cada aplicación de SICAT o función determinada. Las licencias devueltas están disponibles para una nueva activación en el mismo PC o en otros.
- Si devuelve la licencia completa de una aplicación SICAT, recibirá automáticamente una licencia del Viewer, siempre y cuando la aplicación esté autorizada en su país.
- Si activa una licencia completa, recibirá automáticamente licencias del Viewer para todas las aplicaciones autorizadas en su país.

Podrá saber cómo convertir un código canjeable en una clave de activación en *Canjear códigos* [► *Página 53 - SIDEXIS 4*].

La ventana **Vista general de sus licencias** muestra una vista general de las licencias que están activadas en su PC. En las licencias de demostración, SICAT Suite muestra la fecha de caducidad de las licencias. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 46 - SIDEXIS 4*].


Puede activar licencias de dos maneras:

- Si el PC en el que funciona SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, la activación de licencia puede realizarse automáticamente. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 47 - SIDEXIS 4*].
- Si se desea o si el PC en el que funciona SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet, puede realizar manualmente la activación de licencia utilizando archivos de solicitud de licencia. Debe cargar dichos archivos de solicitud de licencia a la página web de SICAT. A cambio, recibirá un archivo de activación de licencias que deberá activar en SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 49 - SIDEXIS 4*].

Puede desactivar individualmente licencias para cada aplicación o función. Tras desactivar una licencia, puede introducir la misma clave de activación u otra. Las licencias devueltas están disponibles para la activación en el mismo PC o en otros. Encontrará información sobre ello en *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 51 - SIDEXIS 4*].

19.1 ABRIR LA VENTANA "VISTA GENERAL DE SUS LICENCIAS"

1. En la barra de título de SIDEXIS 4, haga clic en el símbolo **Ajustes**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.
2. Haga clic en el grupo **SICAT Suite**.
▶ Se abre el grupo **SICAT Suite**.
3. Haga clic en el botón **Licencias**.
▶ Se abre la ventana **Vista general de sus licencias**:

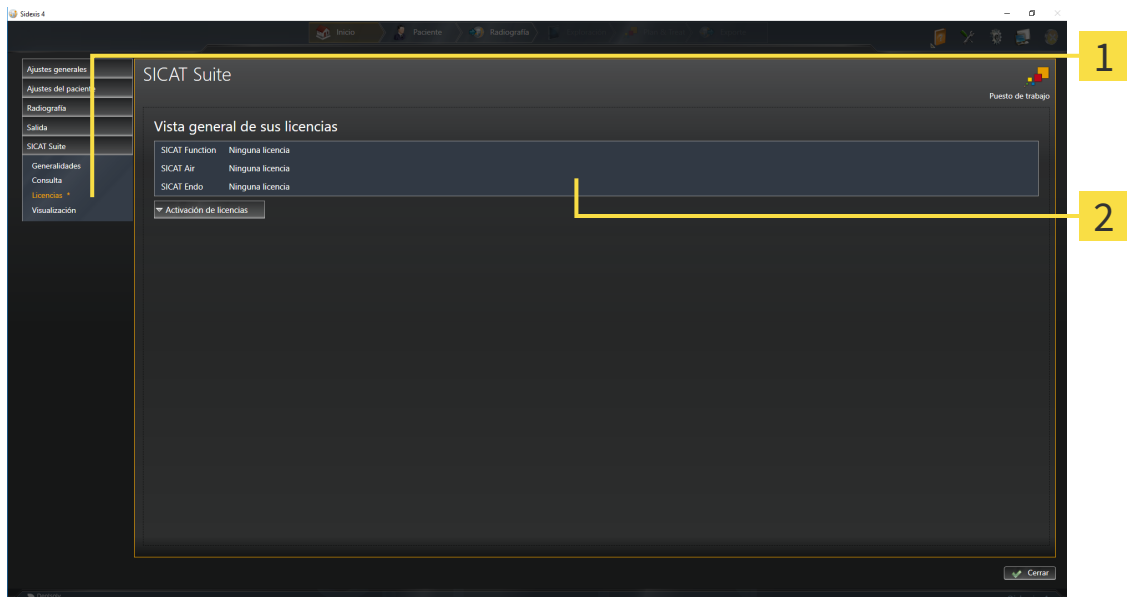

1 Pestaña **Licencias**

2 Ventana **Vista general de sus licencias**

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 47 - SIDEXIS 4*]
- *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 49 - SIDEXIS 4*]
- *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 51 - SIDEXIS 4*]

19.2 ACTIVAR LICENCIAS MEDIANTE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA

La historia clínica debe estar cerrada.


Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

Para iniciar el proceso de activación, haga lo siguiente:

- ☑ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia activada.
- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias" [▶ Página 46 - SIDEXIS 4]*.

1. Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en el botón **Activación de licencias**.

▶ Se abre el área **Vista general de sus licencias**:

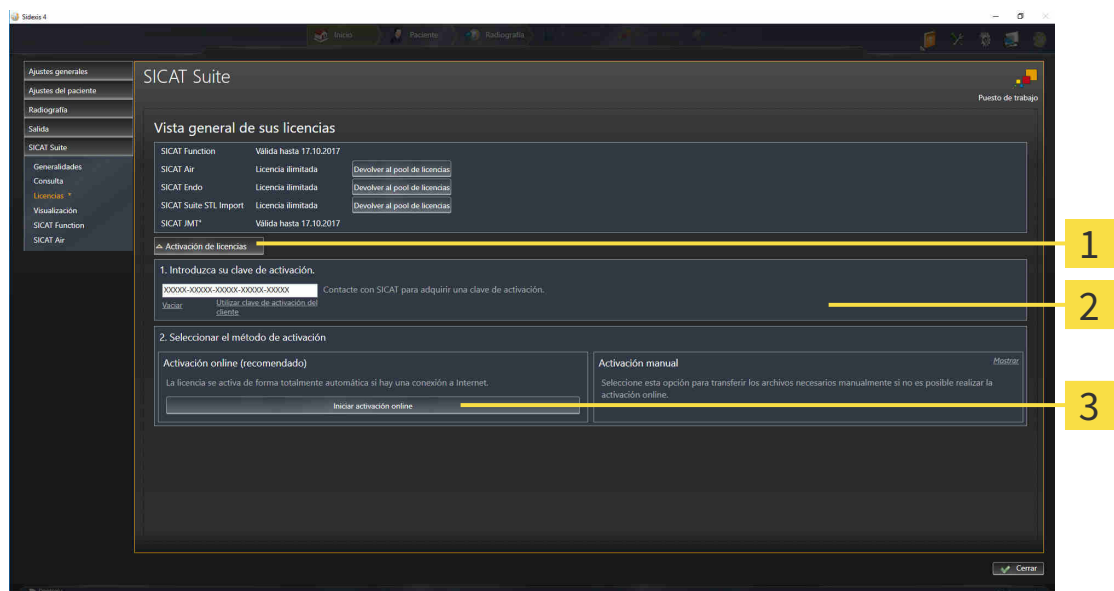

1 Botón **Activación de licencias**

2 Área **Introduzca su clave de activación**

3 Botón **Iniciar activación online**

2. Introduzca su clave de activación en el campo **Introduzca su clave de activación**.

3. Haga clic en el botón **Iniciar activación online**.

4. Si se abre una ventana **Cortafuegos de Windows**, permita a SICAT Suite acceder a Internet.

▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias y se activan en SICAT Suite en el PC actual.

▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente**.

NOTA**Es necesario efectuar un reinicio**

Si la versión de una aplicación de SICAT conectada a SIDEXIS requiere que se reinicie después de modificar una licencia, SICAT Suite abre una ventana de notificación al respecto.



Para volver a activar una aplicación de SICAT, puede usar su clave de activación haciendo clic en el botón **Utilizar clave de activación del cliente** en el área **Introduzca su clave de activación**. Para vaciar el campo con la clave de licencia actual, puede hacer clic en el botón **Vaciar**.

19.3 ACTIVAR LICENCIAS MANUALMENTE O SIN CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA

La historia clínica debe estar cerrada.

Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

Para activar licencias manualmente o sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:


- ☑ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia activada.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [▶ *Página 46 - SIDEXIS 4*].

1. En la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en **Activación de licencias**.

▶ Se abre el área **Activación de licencias**.

2. En el área **Activación manual**, haga clic en **Mostrar**.

▶ Se abre el área **Activación manual**:

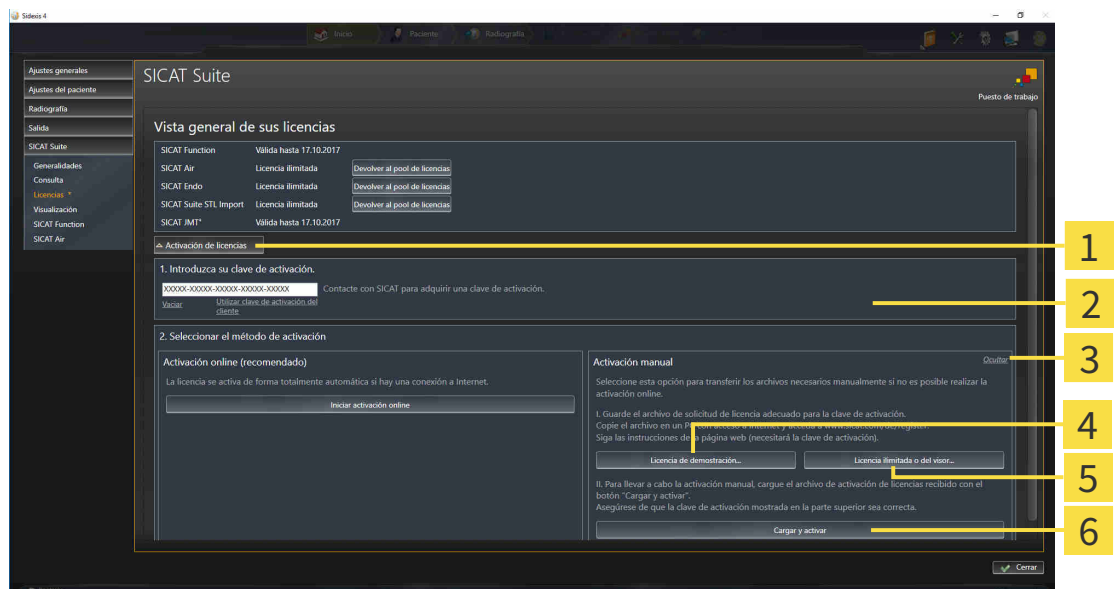

1 Activación de licencias

4 Botón **Licencia de demostración**

2 Área **Introduzca su clave de activación**

5 Botón **Licencia completa o del visor**

3 **Mostrar**

6 Botón **Cargar y activar**

3. Si desea activar una licencia completa, haga clic en el botón **Licencia completa o del visor**.

4. Si desea activar una licencia de demostración, haga clic en el botón **Licencia de demostración**.

▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.

5. Seleccione la carpeta deseada para el archivo de solicitud de licencia y haga clic en **OK**.

▶ Se genera un archivo de solicitud de licencia con la extensión de archivo **WibuCmRaC** y se guarda en la carpeta seleccionada.

6. Copie el archivo de solicitud de licencia en un PC con una conexión activa a Internet, por ejemplo, con la ayuda de una memoria extraíble USB.
7. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
8. Siga las instrucciones de la página web de activación.
 - ▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias.
 - ▶ El servidor de licencias de SICAT genera un archivo de activación de licencias con la extensión de archivo **WibuCmRaU** que debe descargar a su PC.
9. Copie de nuevo el archivo de activación de licencias descargado en el PC en el que se ejecuta SICAT Suite.
10. Compruebe si está la clave correcta en el campo **Introduzca su clave de activación**.
11. Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en el botón **Cargar y activar**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
12. Navegue hasta el archivo de activación de licencias, selecciónelo y haga clic en **OK**.
 - ▶ La licencia del archivo de activación de licencias se instala en SICAT Suite en el PC actual.
 - ▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente**.

NOTA**Es necesario efectuar un reinicio**

Si la versión de una aplicación de SICAT conectada a SIDEXIS requiere que se reinicie después de modificar una licencia, SICAT Suite abre una ventana de notificación al respecto.

19.4 DEVOLVER LICENCIAS AL POOL DE LICENCIAS


NOTA

La historia clínica debe estar cerrada.

Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

Para desactivar una licencia completa y devolverla al pool de licencias, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha activado la licencia completa de una aplicación SICAT.
- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 46 - SIDEXIS 4*].

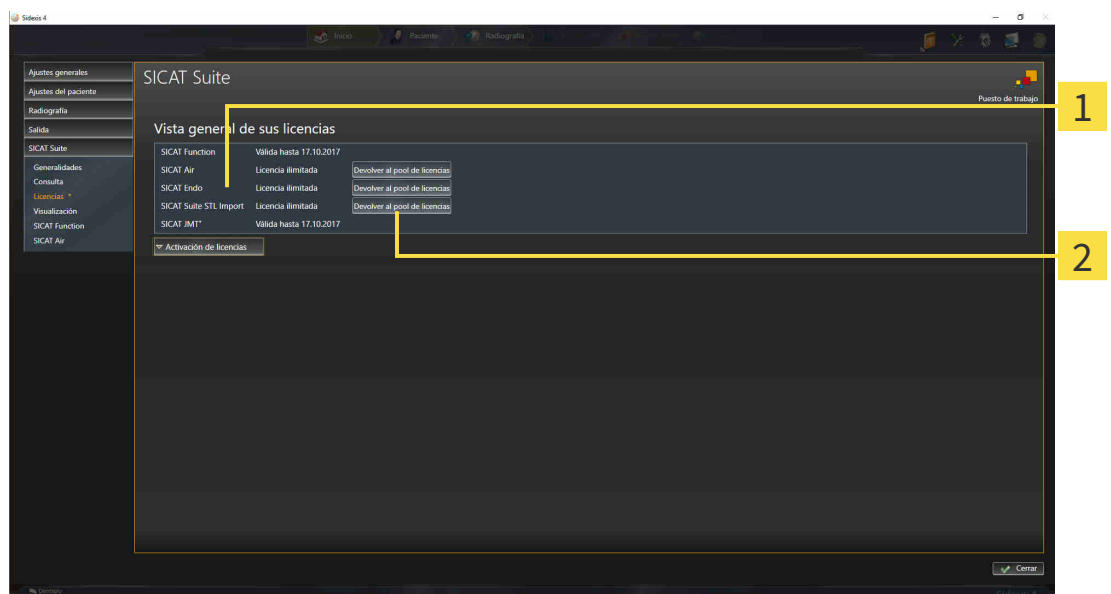

1 Estado de licencia de las aplicaciones SICAT y de funciones concretas

2 Botón **Devolver al pool de licencias**

- Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, en la fila de la aplicación SICAT deseada o de una función concreta, haga clic en el botón **Devolver al pool de licencias**.
- La licencia seleccionada se devuelve al pool de licencias y vuelve a estar disponible para la activación.
- La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha devuelto correctamente al pool de licencias**.
- Sin una licencia, una aplicación solo está disponible en el modo Viewer. Si se han devuelto las licencias de todas las aplicaciones SICAT al pool de licencias, SICAT Suite cambia completamente al modo Viewer.

NOTA

Es necesario efectuar un reinicio

Si la versión de una aplicación de SICAT conectada a SIDEXIS requiere que se reinicie después de modificar una licencia, SICAT Suite abre una ventana de notificación al respecto.



Si desea desactivar una licencia en un PC sin tener conexión activa a Internet, póngase en contacto con la asistencia SICAT.

19.5 CANJEAR CÓDIGOS

1. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
2. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - ▶ Se abrirá el portal SICAT.
3. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
4. En la administración de cuentas, haga clic en la entrada para administrar sus licencias.
5. Introduzca su código canjeable y confírmelo.
 - ▶ El portal SICAT genera una clave de licencia y añade la clave de licencia a su clave de activación.
6. Inicie SICAT Suite y active la licencia.


Encontrará información al respecto en *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 47 - SIDEXIS 4*] y *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 49 - SIDEXIS 4*].



Encontrará más ayuda en la sección de preguntas más frecuentes (FAQ) del portal SICAT.

20 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT ENDO

La interfaz de usuario de SICAT Endo consta de las siguientes secciones:

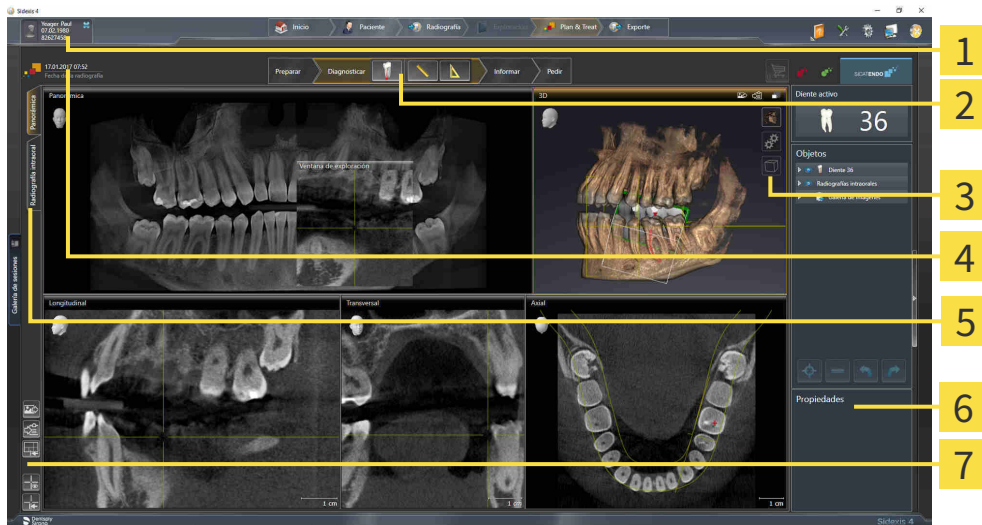

- | | |
|---|--|
| 1 Pestaña Historias clínicas activas | 5 Botones para cambiar de área de trabajo |
| 2 Barra de herramientas del flujo de trabajo | 6 Barra de objetos |
| 3 Barra de herramientas de la vista | 7 Barra de herramientas del área de trabajo |

4 Información acerca de la radiografía 3D abierta

- La pestaña **Historias clínicas activas** muestra los atributos de la historia clínica activa.
- La **Barra de herramientas del flujo de trabajo** consta de distintos pasos de flujo de trabajo que contienen las herramientas principales del flujo de trabajo de la aplicación. Esto incluye herramientas con las que se pueden añadir e importar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 55 - SIDEXIS 4*].
- La **Región del área de trabajo** es la parte de la interfaz de usuario situada debajo de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Muestra el área de trabajo activa de SICAT Endo. Cada área de trabajo contiene una combinación determinada de vistas. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [► *Página 65 - SIDEXIS 4*].
- La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista**. Contiene herramientas para ajustar la visualización de la vista respectiva. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [► *Página 73 - SIDEXIS 4*] y *Adaptar la vista 3D* [► *Página 86 - SIDEXIS 4*].
- La **Barra de objetos** contiene herramientas para administrar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información al respecto en *Barra de objetos* [► *Página 57 - SIDEXIS 4*] y *Objetos de SICAT Endo* [► *Página 61 - SIDEXIS 4*].
- La **Barra de herramientas del área de trabajo** contiene herramientas para modificar ajustes generales de áreas de trabajo y todas las vistas contenidas y para documentar el contenido de áreas de trabajo. Encontrará información al respecto en *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [► *Página 81 - SIDEXIS 4*], *Restablecer vistas* [► *Página 84 - SIDEXIS 4*], *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [► *Página 70 - SIDEXIS 4*] y *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [► *Página 71 - SIDEXIS 4*].

20.1 BARRA DE HERRAMIENTAS DEL FLUJO DE TRABAJO


En SICAT Endo, la **Barra de herramientas del flujo de trabajo** se compone de cuatro pasos de flujo de trabajo:

1. **Preparar**
2. **Diagnosticar**
3. **Informar**
4. **Pedir**

CONTRAER Y EXPANDIR PASOS DE FLUJO DE TRABAJO

Puede contraer y expandir los pasos de flujo de trabajo haciendo clic en ellos.

1. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «PREPARAR»

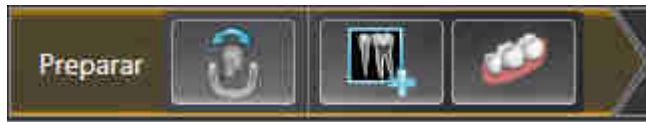

En el paso de flujo de trabajo **Preparar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** - Encontrará información al respecto en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 95 - SIDEXIS 4*] y *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 100 - SIDEXIS 4*].




- **Administrando y registrando radiografías intraorales** Encontrará información al respecto en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 116 - SIDEXIS 4*], *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ *Página 121 - SIDEXIS 4*] y *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 123 - SIDEXIS 4*].



- **Importar y registrar impresiones ópticas** - Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 104 - SIDEXIS 4*].

2. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «DIAGNOSTICAR»

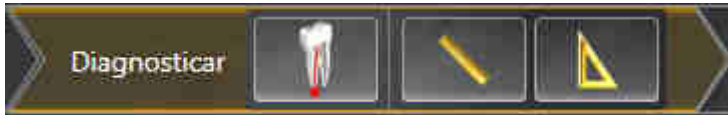

En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Planificando el tratamiento de la raíz con ayuda de EndoLines y canales de perforación** Encontrará información al respecto en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 140 - SIDEXIS 4*], *Colocar EndoLines* [▶ *Página 142 - SIDEXIS 4*] y *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 151 - SIDEXIS 4*].



- **Añadir medición de distancias (D)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 158 - SIDEXIS 4*].



- **Añadir medición de ángulo (A)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 159 - SIDEXIS 4*].

3. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «INFORMAR»



En el paso de flujo de trabajo **Informar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Dibujar flecha** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 164 - SIDEXIS 4*].




- **Dibujar círculo** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 164 - SIDEXIS 4*].



- **Creando informe** - Encontrará información sobre ello en *Preparar impresos* [▶ *Página 167 - SIDEXIS 4*].

4. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «PEDIR»

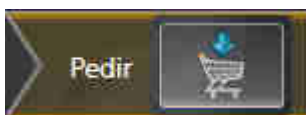


En el paso de flujo de trabajo **Pedir** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)** - Encontrará información sobre ello en *Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra* [▶ *Página 172 - SIDEXIS 4*].

20.2 BARRA DE OBJETOS

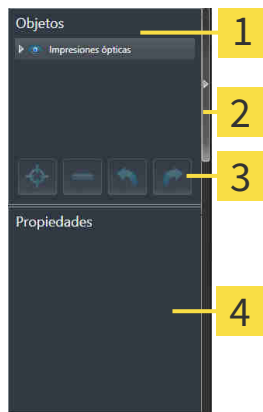

- 1** Navegador de objetos
- 2** Botón **Ocultar la barra de objetos** o botón **Mostrar la barra de objetos**
- 3** Barra de herramientas del objeto
- 4** Área **Propiedades**

La **Barra de objetos** contiene los siguientes elementos:

- El **Navegador de objetos** muestra una lista categorizada de todos los objetos de diagnóstico y los objetos planificados que ha añadido al estudio actual o que ha importado sobre este estudio. El **Navegador de objetos** agrupa objetos automáticamente. Por ejemplo, el grupo **Mediciones** contiene todos los objetos de medición. Puede contraer o expandir grupos de objetos, activar objetos y grupos de objetos y mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*].
- La **Barra de herramientas del objeto** contiene herramientas para enfocar objetos, eliminar objetos o grupos de objetos y deshacer o rehacer acciones de objetos o de grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].
- El área **Propiedades** muestra los detalles del objeto activo.


Puede modificar la visibilidad de la **Barra de objetos** con dos botones en el lado derecho de la **Barra de objetos**: **Ocultar la barra de objetos** y **Mostrar la barra de objetos**

Los objetos que están disponibles en SICAT Endo se encuentran en *Objetos de SICAT Endo* [▶ *Página 61 - SIDEXIS 4*].

20.3 GESTIONAR OBJETOS CON EL NAVEGADOR DE OBJETOS

CONTRAER Y EXPANDIR GRUPOS DE OBJETOS

Para contraer y expandir un grupo de objetos, haga lo siguiente:

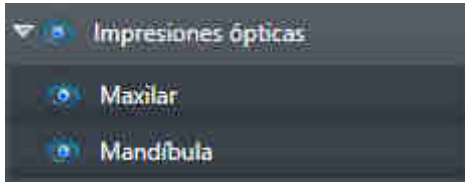

El grupo de objetos deseado está expandido actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Contraer** situado junto al grupo de objetos deseado.
 - ▶ El grupo de objetos se contrae.



2. Haga clic en el símbolo **Expandir** situado junto al grupo de objetos deseado.
 - ▶ El grupo de objetos se expande.

ACTIVAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Algunas herramientas solo están disponibles para objetos o grupos de objetos activos.

Para activar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

El objeto o el grupo de objetos deseado está desactivado actualmente.

- Haga clic en el objeto o grupo de objetos deseado.
 - ▶ SICAT Endo desactiva un objeto o grupo de objetos previamente activado.
 - ▶ SICAT Endo activa el objeto o grupo de objetos deseado.
 - ▶ SICAT Endo destaca en color el objeto o grupo de objetos en el **Navegador de objetos** y en las vistas.



En las vistas 2D también es posible activar determinados objetos haciendo clic en ellos.

MOSTRAR Y OCULTAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS



Esta función solo está disponible para determinados tipos de objetos.

Para mostrar y ocultar un objeto o grupo de objetos, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto o grupo de objetos deseado se muestra actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Mostrado** o en el símbolo **Algunos mostrados** junto al objeto o grupo de objetos deseado.



- ▶ SICAT Endo oculta el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Endo muestra el símbolo **Oculto** junto al objeto o grupo de objetos.



2. Haga clic en el símbolo **Oculto** situado junto al objeto o grupo de objetos deseado.

- ▶ SICAT Endo muestra el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Endo muestra el símbolo **Mostrado** junto al objeto o grupo de objetos.

20.4 GESTIONAR OBJETOS CON LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL OBJETO



Estas funciones solo están disponibles para determinados tipos de objetos.

ENFOCAR OBJETOS

Utilice esta función para buscar objetos en vistas.

Para enfocar un objeto, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*].



- Haga clic en el símbolo **Enfocar objeto activo (F)**.
- ▶ SICAT Endo desplaza el punto de enfoque de las vistas al objeto activo.
- ▶ SICAT Endo muestra el objeto activo en las vistas.



También puede enfocar objetos haciendo doble clic en ellos en el **Navegador de objetos** o en una vista que no sea la vista **3D**.

ELIMINAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Para eliminar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto o grupo de objetos deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*].



- Haga clic en el símbolo **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)**.
- ▶ SICAT Endo elimina el objeto o grupo de objetos.

DESHACER Y REHACER ACCIONES DE OBJETOS

Para deshacer y rehacer la última acción de objeto o de grupo, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)**.
 - ▶ SICAT Endo deshace la última acción de objeto o de grupo.



2. Haga clic en el símbolo **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)**.
 - ▶ SICAT Endo rehace la última acción de objeto o de grupo deshecha.




Las opciones de deshacer y rehacer solamente están disponibles mientras está abierto un estudio en una aplicación SICAT.

20.5 OBJETOS DE SICAT ENDO

En **Navegador de objetos**, SICAT Endo agrupa grupos de objetos y objetos específicos de la aplicación de la siguiente manera:

- **Radiografías intraorales**
- **Impresiones ópticas**
- **Objeto planificado Endo**
 - **EndoLine**
 - **Canal de perforación**
- **Galería de imágenes**
 - **Imagen**
 - **Imagen de pantalla**

GRUPO DE OBJETOS DE LAS RADIOGRAFÍAS INTRAORALES

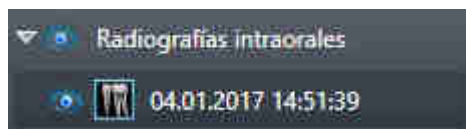

Después de importar y registrar las radiografías intraorales, SICAT Endo muestra un grupo de objetos **Radiografías intraorales** en el **Navegador de objetos**. Un grupo de objetos **Radiografías intraorales** contiene siempre como mínimo una radiografía intraoral. SICAT Endo muestra la fecha y la hora de adquisición para cada radiografía intraoral.

GRUPO DE OBJETOS DE IMPRESIONES ÓPTICAS



Después de importar y registrar al menos una impresión óptica, SICAT Endo muestra un grupo de objetos **Impresiones ópticas** en el **Navegador de objetos**. Un grupo de objetos **Impresiones ópticas** puede contener los siguientes objetos:

- **Maxilar**
- **Mandíbula**

Si se enfoca un objeto, SICAT Endo enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

Si se elimina un objeto **Maxilar** o un objeto **Mandíbula**, SICAT Endo elimina todas las impresiones ópticas del estudio.


GRUPO DE OBJETOS PLANIFICADOS ENDO



Después de haber planificado EndoLines y canales de perforación, SICAT Endo **muestra grupos de objetos planificados Endo** en el **Navegador de objetos**. Un **grupo de objetos planificados Endo** siempre está vinculado a los dientes y contiene los resultados del asistente de EndoLine en forma de EndoLines y canales de perforación. Un **grupo de objetos planificados Endo** contiene EndoLines como objetos y canales de perforación como subobjetos. Los canales de perforación están siempre enlazados a un EndoLine. Con ayuda de los canales de perforación, podrá planificar su tratamiento de endodoncia.

Si se enfoca uno de los objetos o subobjetos, SICAT Endo enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

GRUPO DE OBJETOS DE LA GALERÍA DE IMÁGENES

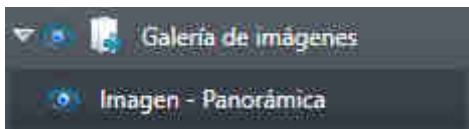

Para el grupo de objetos **Galería de imágenes** se aplica lo siguiente:



- Si sitúa el puntero del ratón sobre un grupo de objetos **Galería de imágenes**, SICAT Endo muestra un símbolo de una rueda dentada. Al hacer clic en ese símbolo, SICAT Endo abre la ventana **Creación del informe**.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un grupo de objetos **Galería de imágenes**. SICAT Endo elimina todos los objetos de **Imagen** correspondientes y los objetos **Imagen de pantalla**.


OBJETOS DE IMÁGENES



Para los objetos **Imagen** se aplica lo siguiente:

- **Imagen** Los objetos están debajo de los grupos de objetos **Galería de imágenes**.
- SICAT Endo Para cada vista 2D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de un corte y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- SICAT Endo para la vista 3D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de una determinada posición y un determinado factor de zoom y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar las funciones **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)** y **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)** para anotaciones individuales.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen** y, con él, todas las anotaciones que contenga a la vez. SICAT Endo elimina los objetos **Imagen** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Creación del informe**.
- Si enfoca un objeto **Imagen**, SICAT Endo crea la vista correspondiente para el momento en que haya creado la última anotación contenida.

OBJETOS DE CAPTURAS DE PANTALLA

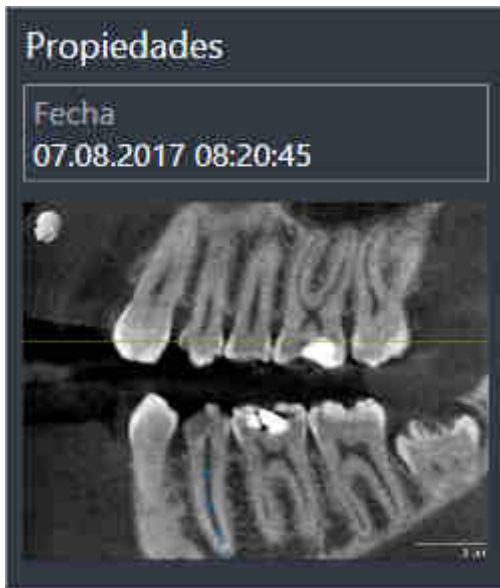

Para los objetos **Imagen de pantalla** se aplica lo siguiente:

- **Imagen de pantalla** Los objetos están debajo de los grupos de objetos **Galería de imágenes**.
- SICAT Endo crea un objeto **Imagen de pantalla** por cada captura de pantalla.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen de pantalla**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen de pantalla**. SICAT Endo elimina los objetos **Imagen de pantalla** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Creación del informe**.
- Si enfoca un objeto **Imagen de pantalla**, SICAT Endo crea la vista correspondiente para el momento en que se creara el objeto.
- Las funciones de mostrar y ocultar no están disponibles.

21 ÁREAS DE TRABAJO

Las aplicaciones SICAT representan estudios en distintas vistas y disponen combinaciones de vistas en áreas de trabajo.

En **SICAT Endo** hay dos áreas de trabajo distintas:




- Área de trabajo **panorámica**: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo panorámica* [▶ *Página 66 - SIDEXIS 4*].
- Área de trabajo de la **radiografía intraoral**: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral* [▶ *Página 68 - SIDEXIS 4*].

Las siguientes acciones están disponibles para las áreas de trabajo y las vistas contenidas:

- *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 69 - SIDEXIS 4*].
- *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [▶ *Página 70 - SIDEXIS 4*].
- *Ajustar las vistas* [▶ *Página 73 - SIDEXIS 4*].
- Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 86 - SIDEXIS 4*].
- Es posible documentar el contenido del área de trabajo activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [▶ *Página 71 - SIDEXIS 4*].

21.1 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO PANORÁMICA

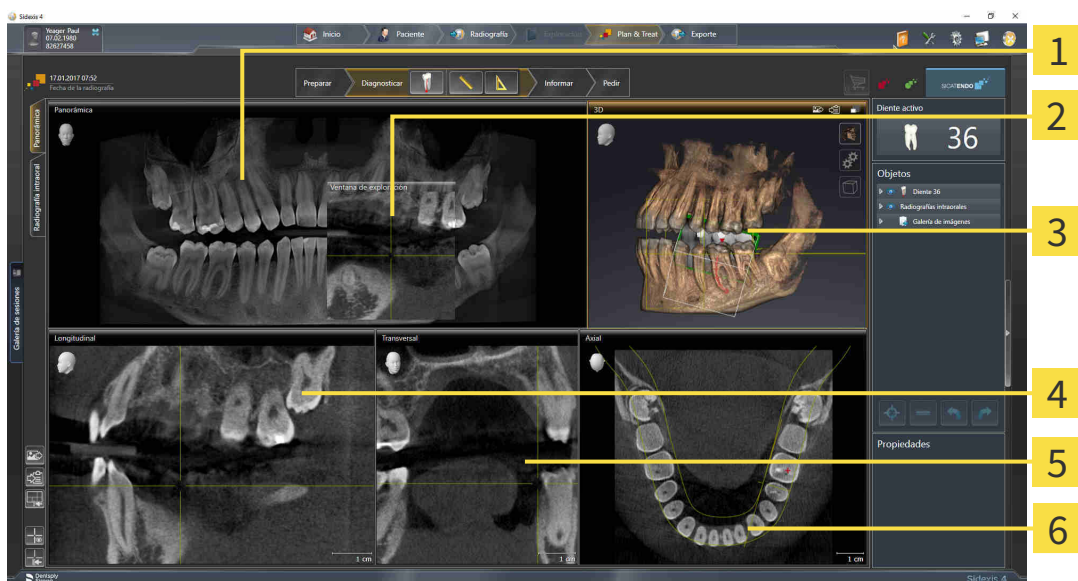

1 PanorámicaVista

2 Ventana explor

3 3DVista

4 LongitudinalVista

5 TransversalVista

6 AxialVista

VISTA PANORÁMICA

La vista **Panorámica** se corresponde con un ortopantomograma virtual (OPG). Muestra una proyección ortogonal a la curva panorámica con un grosor determinado. Puede ajustar la curva panorámica y el grosor a ambos maxilares. Encontrará más información al respecto en *Ajustar el área panorámica* [►Página 100 - SIDEXIS 4].

VENTANA EXPLOR.

La **Ventana explor** está incrustada en la vista **Panorámica**. Añade la tercera dimensión a la vista **Panorámica** mostrando cortes en paralelo a la curva panorámica. Puede mostrar y ocultar la **Ventana explor**. Encontrará más información al respecto en *Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración* [►Página 82 - SIDEXIS 4].

VISTA 3D

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

VISTA LONGITUDINAL

La vista **Longitudinal** muestra cortes tangenciales con respecto a la curva panorámica.

VISTA TRANSVERSAL


La vista **Transversal** muestra cortes ortogonales con respecto a la curva panorámica.

VISTA AXIAL

De forma predeterminada, la vista **Axial** muestra cortes desde arriba. Puede cambiar la posición de la vista **Axial**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 192 - SIDEXIS 4*].

Encontrará las funciones de las vistas en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 73 - SIDEXIS 4*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 86 - SIDEXIS 4*].

21.2 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

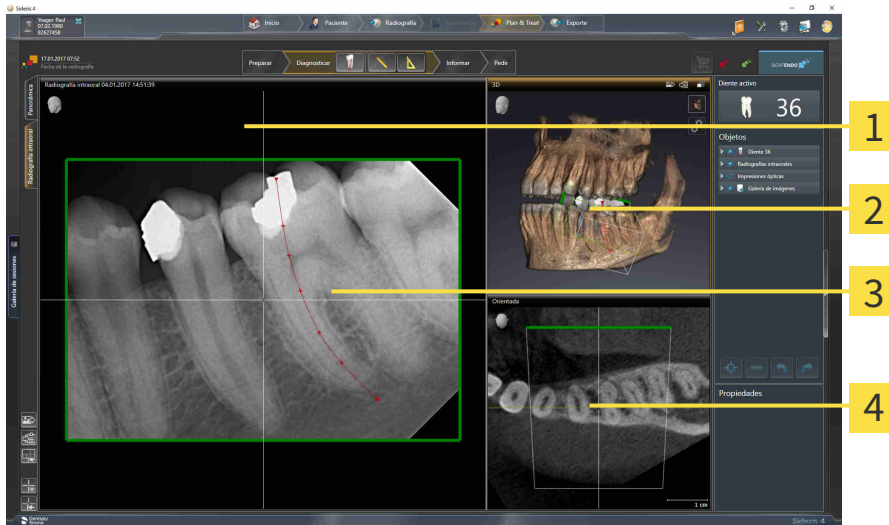

- 1 Radiografía intraoral Vista**
- 2 3D Vista**
- 3 Ventana de exploración**
- 4 Orientada Vista**

RADIOGRAFÍA INTRAORAL VISTA

La vista **Radiografía intraoral** muestra la radiografía intraoral seleccionada en el navegador de objetos.

VENTANA EXPLOR.

La **Ventana explor** está incrustada en la vista **Radiografía intraoral**. Añade la tercera dimensión a la vista **Radiografía intraoral** mostrando cortes en paralelo a la radiografía intraoral. Puede mostrar u ocultar la **Ventana explor** y utilizarla para comprobar el registro o evaluar canales de raíces.

3DVISTA

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

ORIENTADA VISTA

De forma estándar, la vista **Orientada** muestra un corte por la radiografía intraoral que se define por la posición del retículo en la vista **Radiografía intraoral**.

21.3 CAMBIAR EL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para cambiar el área de trabajo activa, haga lo siguiente:



- En la esquina superior izquierda de la región del área de trabajo, haga clic en la pestaña del área de trabajo deseada.
- ▶ Se abre el área de trabajo seleccionada.

21.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL FORMATO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

AJUSTAR EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para ajustar el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el límite entre dos o varias vistas.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma:



2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La posición del límite cambia.
 - ▶ Se cambian los tamaños de las vistas en todos los lados del límite.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo conserva la posición actual del límite y los tamaños actuales de las vistas en todos los lados del límite.

RESTABLECER EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para restablecer el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:



- Haga clic en el símbolo **Restablecer el formato del área de trabajo activa** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.
- ▶ SICAT Endo restablece el área de trabajo activa al formato estándar. Esto significa que el software muestra todas las vistas en sus tamaños estándar.

21.5 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE ÁREAS DE TRABAJO

A efectos de documentación, puede copiar capturas de pantalla de las áreas de trabajo en el portapapeles de Windows.

AÑADIR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UN ÁREA DE TRABAJO A LA EDICIÓN DE SIDEXIS 4

Para añadir una captura de pantalla de un área de trabajo a la edición de SIDEXIS 4, haga lo siguiente:

- ☑ El área de trabajo deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 69 - SIDEXIS 4*].



- En la barra de herramientas del área de trabajo, haga clic en el símbolo **Añadir captura de pantalla del área de trabajo activa a la edición de SIDEXIS 4**.

- ▶ SICAT Endo añade una captura de pantalla del área de trabajo a la edición de SIDEXIS 4.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UN ÁREA DE TRABAJO EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar la captura de pantalla de un área de trabajo en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- ☑ El área de trabajo deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 69 - SIDEXIS 4*].



- En la barra de herramientas del área de trabajo, haga clic en el símbolo **Copiar captura de pantalla del área de trabajo activa en el portapapeles**.

- ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla del área de trabajo en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl +V.

22 VISTAS


Las vistas están incluidas en las áreas de trabajo. Encontrará una descripción de las distintas áreas de trabajo y vistas en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 65 - SIDEXIS 4*].

Puede ajustar las vistas. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 73 - SIDEXIS 4*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 86 - SIDEXIS 4*].

22.1 AJUSTAR LAS VISTAS

Algunas herramientas para ajustar las vistas solo están disponibles para la vista activa. Encontrará la manera de activar una vista en *Cambiar la vista activa* [► *Página 75 - SIDEXIS 4*].

Una vista activa contiene los siguientes elementos:

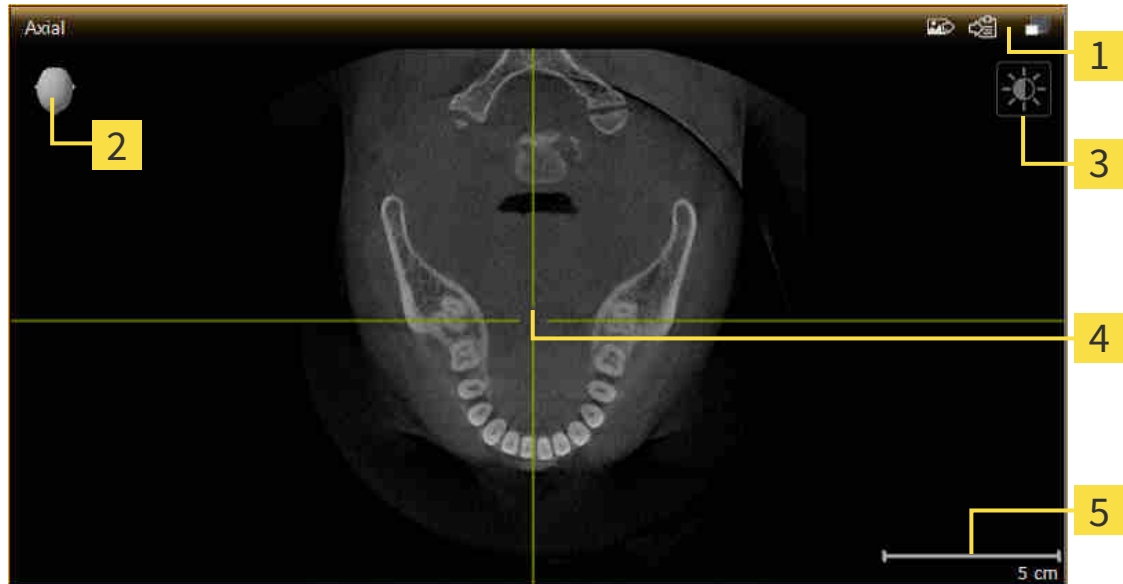

- 1** Barra de título
- 2** Cabezal de orientación
- 3** Barra de herramientas de la vista
- 4** Retículo
- 5** Escala

Las vistas de corte 2D muestran retículos. Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte. SICAT Endo sincroniza todas las vistas de corte entre sí. Esto significa que todos los retículos apuntan a la misma posición dentro de los datos radiográficos 3D. Con ello podrá asignar estructuras anatómicas más allá de las vistas.

La vista **3D** muestra los marcos que visualizan las posiciones actuales de las vistas de corte 2D.

Para ajustar las vistas están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 75 - SIDEXIS 4*]
- *Maximizar y restablecer vistas* [▶ *Página 76 - SIDEXIS 4*]
- *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 77 - SIDEXIS 4*]
- *Ampliar vistas y desplazar secciones* [▶ *Página 79 - SIDEXIS 4*]
- *Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D* [▶ *Página 80 - SIDEXIS 4*]
- *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [▶ *Página 81 - SIDEXIS 4*]
- *Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración* [▶ *Página 82 - SIDEXIS 4*]
- *Restablecer vistas* [▶ *Página 84 - SIDEXIS 4*]

Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 86 - SIDEXIS 4*].


Puede documentar el contenido de una vista activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de vistas* [▶ *Página 85 - SIDEXIS 4*].

22.2 CAMBIAR LA VISTA ACTIVA

La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista** y la barra de título.

Para activar una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada:

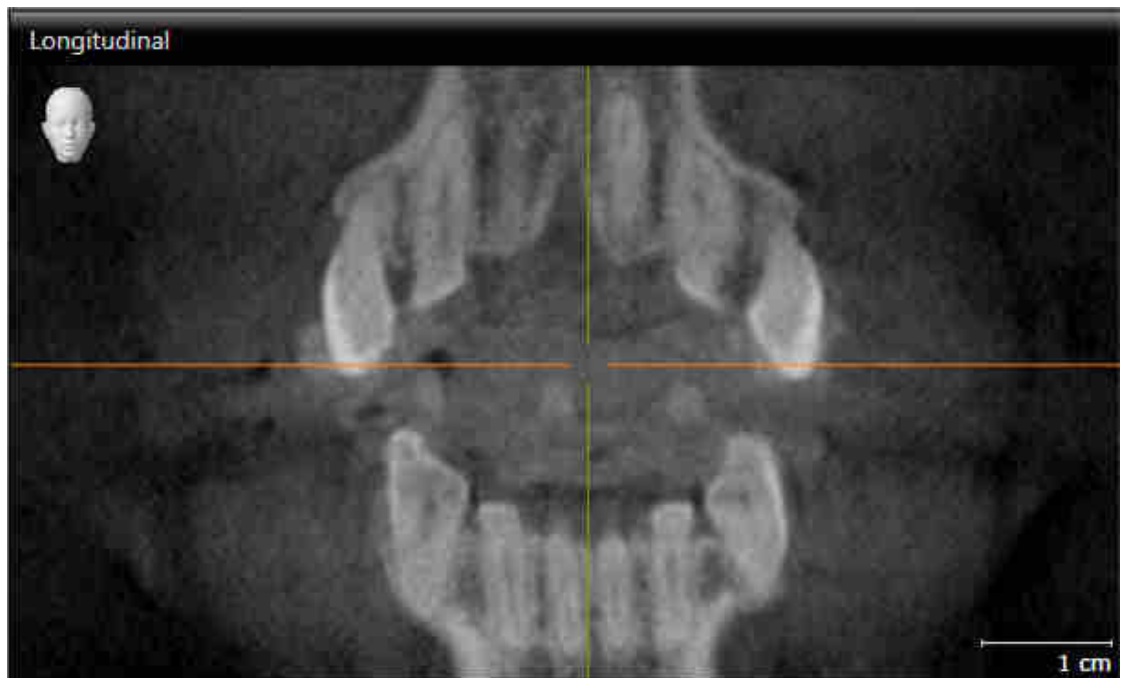

2. Haga clic en la vista que desee.

► SICAT Endo activa la vista:



La vista activa se reconoce porque la barra de título es de color naranja.

22.3 MAXIMIZAR Y RESTABLECER VISTAS

Para maximizar una vista y restablecer su tamaño anterior, haga lo siguiente:

- ☑ La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 75 - SIDEXIS 4*].
- ☑ La vista deseada no está maximizada.



1. En la barra de título de la vista deseada, haga clic en el símbolo **Maximizar**.
 - ▶ SICAT Endo maximiza la vista.



2. En la barra de título de la vista maximizada, haga clic en el símbolo **Restaurar**.
 - ▶ SICAT Endo restablece el tamaño anterior de la vista.



Para maximizar las vistas y restablecer su tamaño anterior, están disponibles las siguientes alternativas:

- Para maximizar una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista deseada.
- Para restablecer el tamaño anterior de una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista maximizada.

22.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL BRILLO Y EL CONTRASTE DE LAS VISTAS 2D

Para ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D, haga lo siguiente:

- ☑ La vista 2D deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 75 - SIDEXIS 4*].



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista 2D, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Ajustar brillo y contraste**.

▶ Se abre la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**:



2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Brillo**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ SICAT Endo adapta el brillo de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Brillo**.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el brillo actual de la vista 2D.



5. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Contraste**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ SICAT Endo adapta el contraste de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Contraste**.
7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el contraste actual de la vista 2D.
8. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**.
 - ▶ La ventana transparente **Ajustar brillo y contraste** se cierra.



Para restablecer el brillo y el contraste de la vista 2D a los valores estándar, puede hacer clic en el símbolo **Restablecer brillo y contraste**.



El brillo y el contraste de todas las vistas de corte 2D están adaptados entre sí.

22.5 AMPLIAR VISTAS Y DESPLAZAR SECCIONES

AMPLIAR UNA VISTA

La opción de zoom amplía o reduce el contenido de una vista.

Para aplicar el zoom en una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Gire la rueda del ratón hacia delante.
 - ▶ La vista se ampliará.
3. Gire la rueda del ratón hacia atrás.
 - ▶ La vista se reducirá.



Como alternativa, puede pulsar la rueda del ratón y mover el ratón hacia arriba o hacia abajo para reducir o ampliar la vista.

DESPLAZAR LA SECCIÓN DE UNA VISTA

Para desplazar la sección de una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón derecho del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La sección de la vista se desplaza según el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón derecho del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la sección actual de la vista.

22.6 DESPLAZARSE POR LOS CORTES DE LAS VISTAS DE CORTE 2D

Para desplazarse por los cortes de una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una flecha bidireccional.
3. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ A excepción del corte **Transversal**, los cortes se mueven de forma paralela.
 - ▶ El corte **Transversal** se mueve a lo largo de la curva panorámica.
 - ▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el corte actual.

22.7 MOVER, OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS

MOVER UN RETÍCULO

Para mover el retículo en una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.

1. En la vista que desee, sitúe el puntero del ratón en el centro del retículo.

▶ El puntero del ratón se transforma en un retículo:



2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3. Desplace el ratón.

▶ El retículo de la vista sigue el movimiento del ratón.

▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.

▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.

4. Suelte el botón izquierdo del ratón.

▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del retículo.



Para desplazar de inmediato el retículo a la posición de puntero del ratón, también puede hacer doble clic en una vista 2D.

OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS

Para ocultar y mostrar todos los retículos y los marcos, haga lo siguiente:

Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.



1. Haga clic en el símbolo **Ocultar retículos y marcos** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.

▶ SICAT Endo oculta los retículos en todas las vistas de corte 2D.

▶ SICAT Endo oculta los marcos en la vista **3D**.



2. Haga clic en el símbolo **Mostrar retículos y marcos**.

▶ SICAT Endo muestra los retículos en todas las vistas de corte 2D.

▶ SICAT Endo muestra los marcos en la vista **3D**.

22.8 DESPLAZAR, OCULTAR Y VISUALIZAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN

DESPLAZAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN

Para desplazar la **Ventana explor**, haga lo siguiente:

- El área de trabajo **Panorámica** o el área de trabajo **Radiografía intraoral** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 69 - SIDEXIS 4*].
- La **Ventana explor** ya se muestra:



1. En la vista **Panorámica** o en la vista **Radiografía intraoral**, sitúe el puntero del ratón sobre la barra de título **Ventana explor**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una mano.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La **Ventana explor** sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la **Ventana explor**.

OCULTAR Y MOSTRAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN



El icono que indica si la **Ventana explor** se está mostrando o está oculta es a la vez indicador de estado e interruptor.

Para ocultar y mostrar la **Ventana explor**, haga lo siguiente:

- El área de trabajo **Panorámica** o el área de trabajo **Radiografía intraoral** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 69 - SIDEXIS 4*].
- La **Ventana explor** ya se muestra.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **Panorámica** o de la vista **Radiografía intraoral**, haga clic en el símbolo **Ocultar la ventana de exploración**.

▶ SICAT Endo oculta la **Ventana explor**.



2. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **Panorámica** o de la vista **Radiografía intraoral**, haga clic en el símbolo **Mostrar la ventana de exploración**.

▶ SICAT Endo muestra la **Ventana explor**.

22.9 RESTABLECER VISTAS

Para restablecer todas las vistas, haga lo siguiente:



- En la **Barra de herramientas del área de trabajo**, haga clic en el icono **Restablecer vistas**.
- ▶ SICAT Endo restablece en todas las vistas los valores estándar para el zoom, el desplazamiento de las secciones, el desplazamiento, el desplazamiento de los retículos y el desplazamiento de la **Ventana explor**.
- ▶ SICAT Endo restablece la posición de la vista **3D** al valor estándar.

22.10 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE VISTAS

A efectos de documentación, puede realizar capturas de pantalla de las vistas y enviarlas de las siguientes maneras:

- Añadir a la edición de SIDEXIS 4.
- Copiar en el portapapeles de Windows.

AÑADIR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UNA VISTA A LA EDICIÓN DE SIDEXIS 4

- Se ha iniciado SICAT Endo desde SIDEXIS 4.
- La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 75 - SIDEXIS 4*].



- En la barra de título de la vista, haga clic en el símbolo **Añadir captura de pantalla a la edición de SIDEXIS 4**.

► SICAT Endo añade una captura de pantalla de la vista a la edición de SIDEXIS 4.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UNA VISTA EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar una captura de pantalla de una vista en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 75 - SIDEXIS 4*].



- En la barra de título de la vista, haga clic en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

► SICAT Endo copia una captura de pantalla de la vista en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl +V.

23 ADAPTAR LA VISTA 3D

Puede modificar la posición de la vista **3D** en cualquier momento. Encontrará información sobre ello en *Modificar la posición de la vista 3D* [▶ *Página 87 - SIDEXIS 4*].

Para configurar la vista **3D**, están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 88 - SIDEXIS 4*]
- *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 89 - SIDEXIS 4*]
- *Girar la vista 3D* [▶ *Página 148 - SIDEXIS 4*]

23.1 MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D

Existen dos opciones para modificar la posición de la vista **3D**:

- Realizar una modificación interactiva
- Seleccionar la posición estándar de la vista.

MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D DE FORMA INTERACTIVA

Para modificar la posición de la vista **3D** de forma interactiva, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista **3D**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una mano.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La posición de la vista se modifica según el movimiento del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la vista **3D**.

SELECCIONAR LA POSICIÓN ESTÁNDAR DE LA VISTA.

Para seleccionar la posición estándar en la vista **3D**, haga lo siguiente:



1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior izquierda de la vista **3D** sobre el símbolo Cabezal de orientación.
 - ▶ Se abre la ventana transparente **Posición de la vista**:



- ▶ En el centro de la ventana transparente **Posición de la vista** se encuentra el Cabezal de orientación destacado, que indica la posición actual de la vista.
2. Haga clic en el símbolo del Cabezal de orientación que indica la posición estándar deseada.
 - ▶ La posición de la vista **3D** se modifica según su selección.
 3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Posición de la vista**.
 - ▶ La ventana transparente **Posición de la vista** se cierra.

23.2 CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA VISTA 3D




Todos los modos de visualización están disponibles en todas las áreas de trabajo.

Para cambiar el modo de visualización de la vista **3D**, haga lo siguiente:

La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 75 - SIDEXIS 4*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar modo de visualización**.

► Se abre la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**:

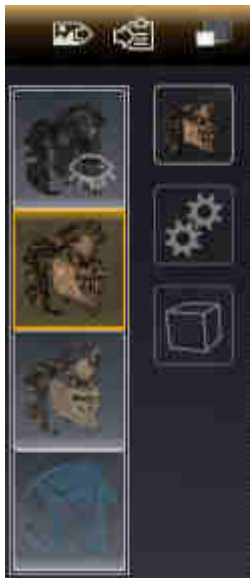

2. Haga clic en el símbolo del modo de visualización que desee.

► SICAT Endo activa el modo de visualización deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**.

► La ventana transparente **Cambiar modo de visualización** se cierra.

23.3 CONFIGURAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN ACTIVO DE LA VISTA 3D



Tan solo los modos de visualización configurables muestran el icono **Configurar modo de visualización activo**. La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** muestra tan solo los ajustes que son relevantes para el modo de visualización activo.

Para configurar el modo de visualización activo de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ☑ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 75 - SIDEXIS 4*].
- ☑ El modo de visualización deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 88 - SIDEXIS 4*].
- ☑ El modo de visualización activo es configurable.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Configurar modo de visualización activo**.

▶ Se abre la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**:



2. Desplace la corredera que desee.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
3. Haga clic en el símbolo de flecha junto a **Ajustes avanzados**, si está disponible.
 - ▶ Se abre el área **Ajustes avanzados**.
4. Active o desactive las casillas de comprobación disponibles.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según el estado de las casillas de comprobación.
5. Desplace la corredera que desee.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
6. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**.
 - ▶ La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** se cierra.



Puede restablecer los ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Restablecer el ajuste predeterminado de la configuración del modo de visualización activo**.



Puede guardar los ajustes actuales como ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Guardar la configuración del modo de visualización activo como ajuste predeterminado**.

23.4 CAMBIAR EL MODO DE DETALLE DE LA VISTA 3D

Para cambiar el modo de detalle de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ☑ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 75 - SIDEXIS 4*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar el modo de detalle**.

► Se abre la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**:



2. Haga clic en el símbolo del modo de detalle deseado.

► SICAT Endo activa el modo de detalle deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**.

► La ventana transparente **Cambiar el modo de detalle** se cierra.

24 ALINEACIÓN DE VOLUMEN Y ÁREA PANORÁMICA



Si es necesario adaptar la alineación del volumen, hágalo cuando comience a trabajar con la radiografía 3D. Si la alineación del volumen se adapta más tarde, quizá sea necesario repetir partes del diagnóstico o de la planificación.

ALINEACIÓN DE VOLUMEN

Es posible adaptar la alineación del volumen para todas las vistas girando el volumen en torno a los tres ejes principales. Esto puede resultar útil en los siguientes casos:


- El paciente no tiene una posición óptima en la radiografía 3D
- La alineación se corresponde al caso de aplicación, por ejemplo, alineación de los cortes axiales en paralelo a la horizontal de Frankfurt o en paralelo al plano oclusal
- Optimización de la vista panorámica.

Si la alineación del volumen se ajusta en SICAT Endo, los cambios se aplican al resto de aplicaciones SICAT.

La manera de ajustar la alineación del volumen se explica en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 95 - SIDEXIS 4*].

ÁREA PANORÁMICA

SICAT Endo calcula la vista **Panorámica** a partir del volumen y del área panorámica. Para optimizar la vista **Panorámica** debe ajustar el área panorámica en los dos maxilares del paciente. Esto es importante para un diagnóstico y una planificación del tratamiento efectivos y eficientes.

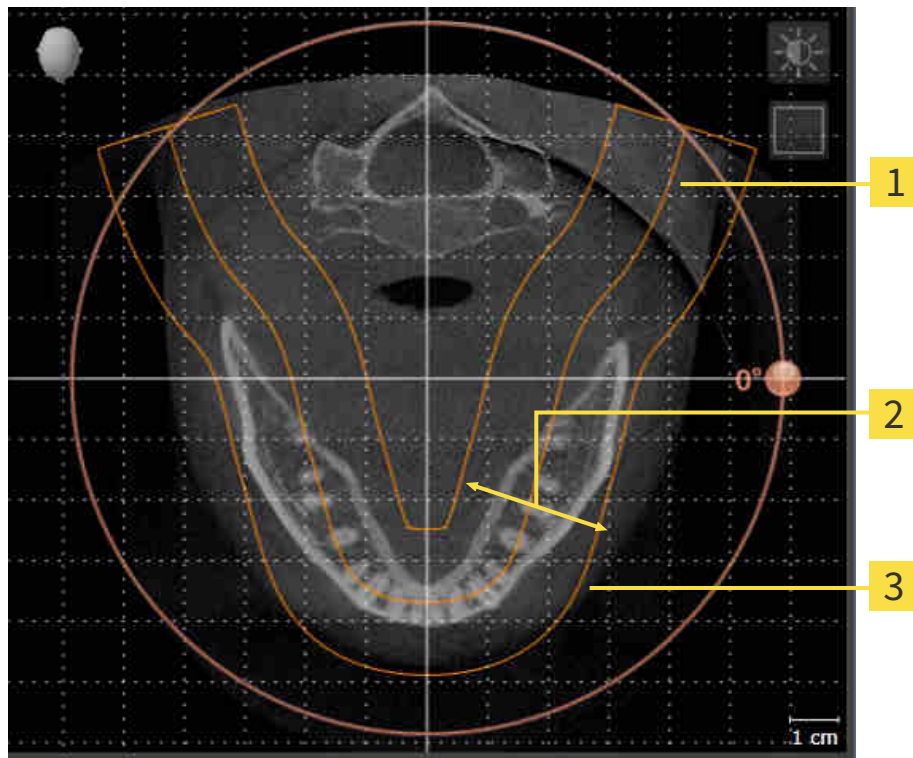

1 Curva panorámica

2 Grosor

3 Área panorámica

El área panorámica se determina mediante estos dos componentes:

- Forma y posición de la curva panorámica
- Grosor del área panorámica.

Para ajustar de forma óptima el área panorámica, deben cumplirse estas dos condiciones:

- El área panorámica debe contener por completo todos los dientes y los dos maxilares.
- El área panorámica debe ser lo más estrecha posible.

Si el área panorámica se ajusta en SICAT Endo, los cambios se aplican al resto de aplicaciones SICAT.


Encontrará la manera de ajustar el área panorámica en *Ajustar el área panorámica* [►Página 100 - SIDE-XIS 4].

SINCRONIZACIÓN DE DATOS ENTRE SICAT ENDO Y SIDEXIS 4

SICAT Endo y SIDEXIS 4 sincronizan la alineación de volumen y el área panorámica en ambos sentidos. A este respecto, se aplican las siguientes limitaciones:

- SICAT Endo solo permite rotaciones de la alineación de volumen de hasta 30 grados.
- Si la sincronización de la alineación de volumen influye en objetos de diagnóstico u objetos planificados ya añadidos que estén basados en otra alineación de volumen, SICAT Endo abre una ventana de notificación. La ventana de notificación informa sobre las repercusiones exactas de la sincronización y permite elegir entre las siguientes opciones:
 - **Sincronizar**
 - **Ahora no**
 - **Nunca** para la radiografía 3D actual y la alineación de volumen actual en SIDEXIS 4
- Si la sincronización del área panorámica influye en objetos de diagnóstico u objetos planificados ya añadidos que estén basados en otra área panorámica ajustada, SICAT Endo abre una ventana de notificación. En la ventana de notificación puede elegir entre dos opciones:
 - **OK** - SICAT Endo lleva a cabo la sincronización y elimina los objetos.
 - **Cancelar** - SICAT Endo no lleva a cabo la sincronización y mantiene los objetos.
- SICAT Endo solo permite las curvas panorámicas estándar de SIDEXIS 4, no el desplazamiento de puntos individuales.
- SICAT Endo solo permite grosores de curva panorámica de al menos 10 mm.
- SICAT Endo solo permite curvas panorámicas que no se hayan rotado en SIDEXIS 4.

Cuando se da al menos una de estas limitaciones, SICAT Endo y SIDEXIS 4 dejan de sincronizar la alineación de volumen y el área panorámica o únicamente el área panorámica.

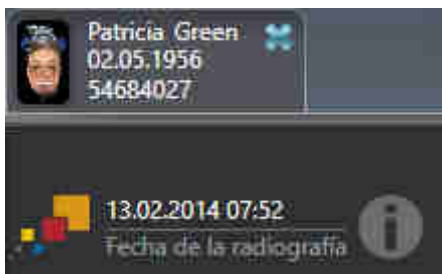

SICAT Endo En este caso muestra un símbolo de información junto a la información de la radiografía 3D actual. Al situar el puntero del ratón sobre este símbolo de información, se muestran los datos que ya no se sincronizan junto con las instrucciones para volver a sincronizar.

24.1 AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN

Encontrará información general sobre la alineación del volumen en *Alineación de volumen y área panorámica* [► *Página 92 - SIDEXIS 4*].

El ajuste de la alineación del volumen consta de los siguientes pasos:

- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Girar el volumen en la vista **Coronal**
- Girar el volumen en la vista **Sagital**
- Girar el volumen en la vista **Axial**


ABRIR LA VENTANA AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.

- Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

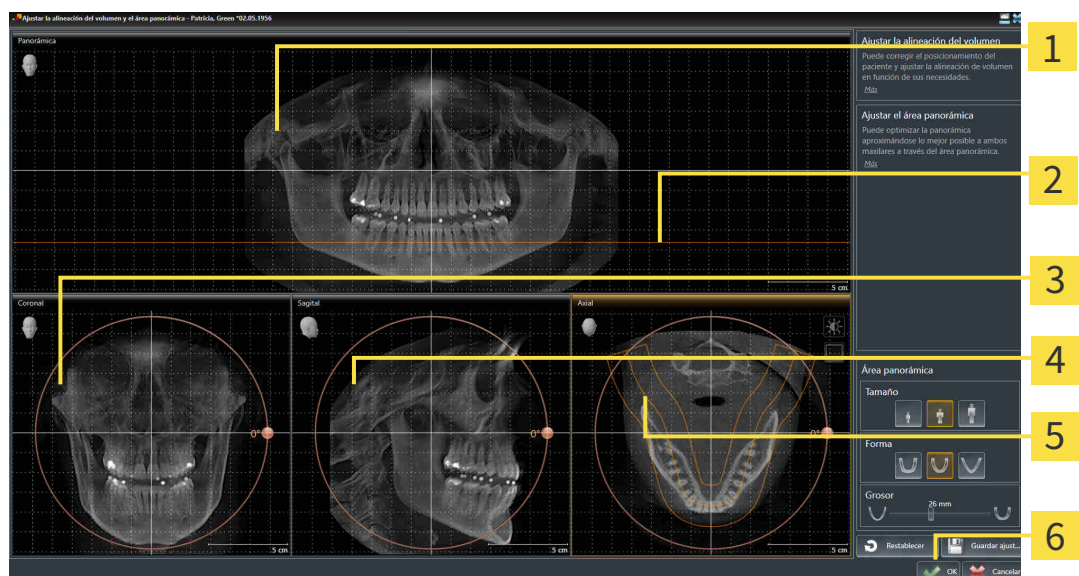

1 Panorámica Vista

2 Línea de referencia axial

3 Coronal Vista con regulador de **Giro**


4 Sagittal Vista con regulador de **Giro**

5 Axial Vista con regulador de **Giro**

6 Botón **OK**

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA CORONAL

1. Active la vista **Coronal**:

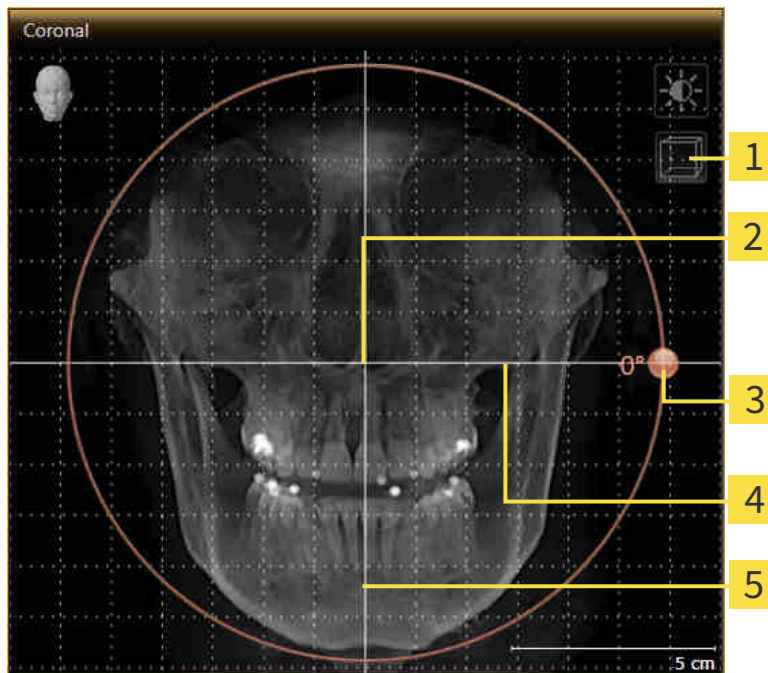


- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de corte o símbolo Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Giro Regulador de | |

2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Coronal**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA SAGITAL

1. Active la vista **Sagital**:

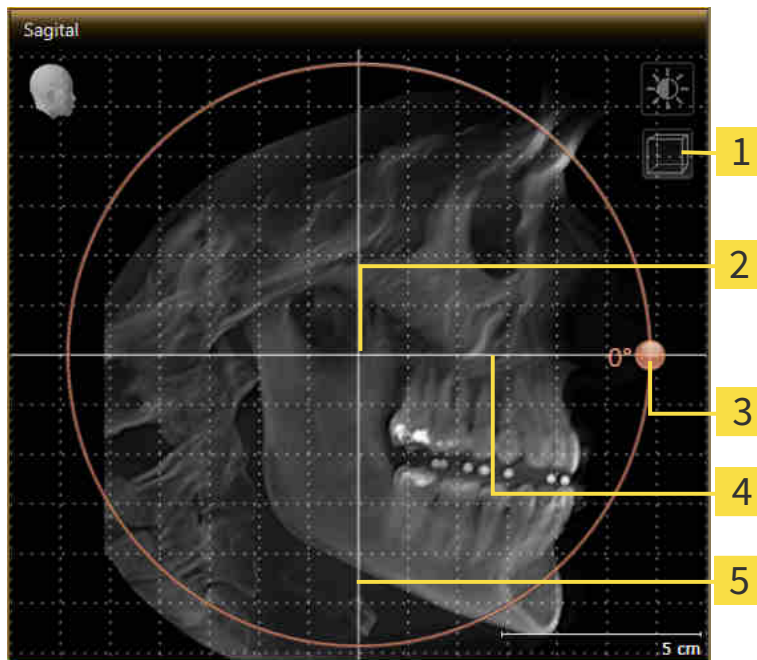


- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de corte o símbolo Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Giro Regulador de | |

2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Sagital**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. Active la vista **Axial**:

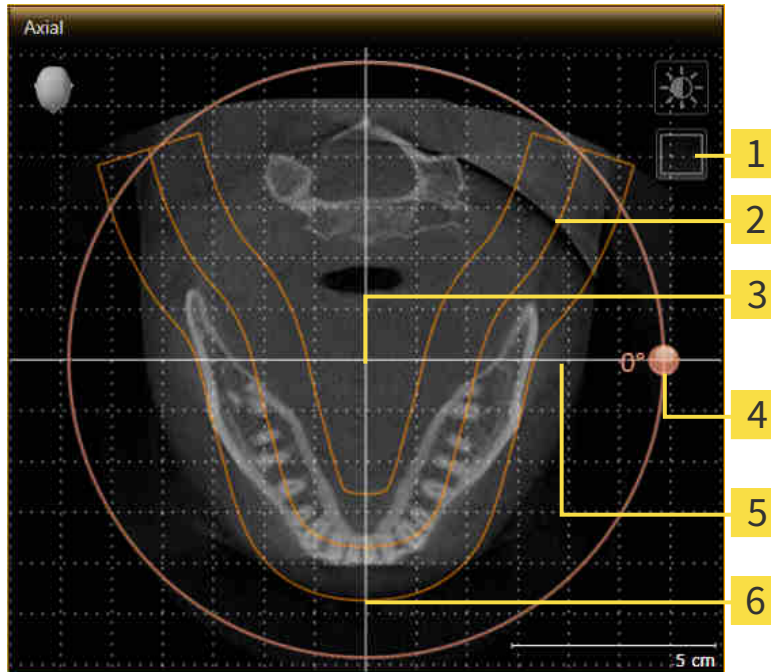

- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de proyección o símbolo Activar el modo de corte | 4 Giro Regulador de |
| 2 Área panorámica | 5 Línea de referencia horizontal |
| 3 Centro de rotación | 6 Línea de referencia vertical |

2. Asegúrese de que el modo de cortes está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
3. Desplácese hasta un corte con las raíces de los dientes de la mandíbula, por ejemplo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la línea de referencia axial en la vista panorámica y moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo sin soltar el botón.
4. En caso necesario, desplace el área panorámica en la vista **Axial** haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el área panorámica y moviendo el ratón sin soltar el botón izquierdo. SICAT Endo desplaza el centro de rotación, la línea de referencia horizontal y la línea de referencia vertical.
5. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
8. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia el área panorámica, la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.
9. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.

- ▶ Si el ajuste de la alineación del volumen tiene efectos en objetos existentes en aplicaciones SICAT, SICAT Endo abre una ventana de notificación que informa sobre los efectos concretos.
10. Si a pesar de ello desea ajustar la alineación del volumen, haga clic en el botón **Ajustar** de la ventana de notificación.
- ▶ SICAT Endo guarda la alineación de volumen ajustada y muestra el volumen alineado de la manera que corresponda en todas las vistas.



Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 77 - SIDEXIS 4*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Endo sincroniza el zoom entre las vistas, exceptuando la vista **Axial**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica, puede hacer clic en el botón **Restablecer**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.

24.2 AJUSTAR EL ÁREA PANORÁMICA

Encontrará información general sobre el área panorámica en *Alineación de volumen y área panorámica* [**►** *Página 92 - SIDEXIS 4*].

El ajuste del área panorámica consta de los siguientes pasos:


- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Ajustar la posición de los cortes de la vista **Axial**
- Desplazar el área panorámica
- Girar el volumen en la vista **Axial**
- **Tamaño**Ajustar , **Forma** y **Grosor** del área panorámica

ABRIR LA VENTANA AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.
- Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

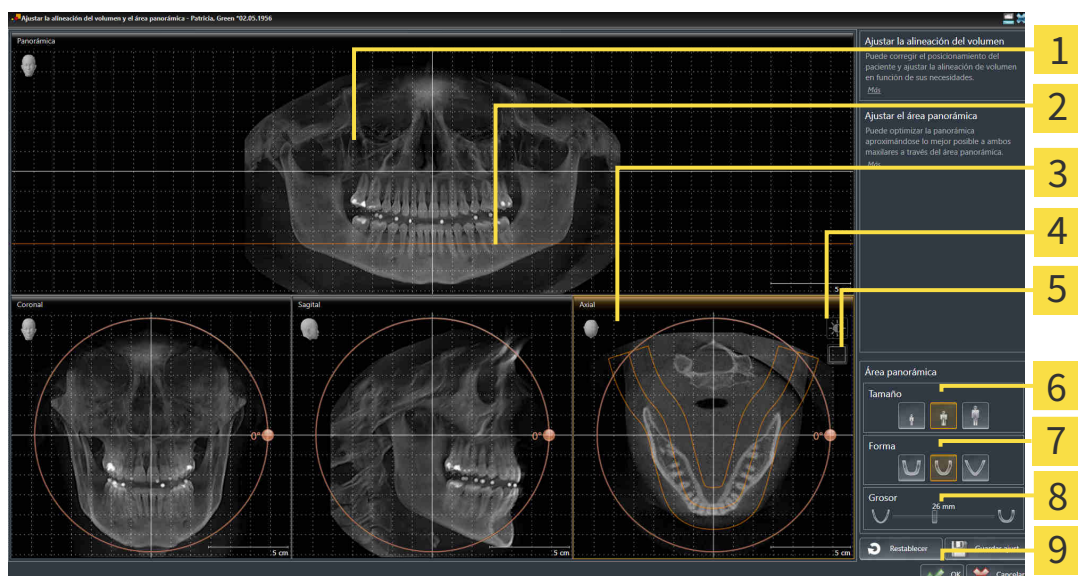

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Panorámica Vista | 6 Tamaño Botones |
| 2 Línea de referencia axial | 7 Forma Botones |
| 3 Axial Vista con regulador de Giro | 8 Grosor Corredera |
| 4 Símbolo Ajustar brillo y contraste | 9 Botón OK |
| 5 Símbolo Activar el modo de proyección o símbolo Activar el modo de corte | |

AJUSTAR LA POSICIÓN DE LOS CORTES DE LA VISTA AXIAL



1. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de cortes. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
2. En la vista **Panorámica**, sitúe el puntero del ratón sobre la línea de referencia axial. La línea de referencia axial muestra la posición actual de los cortes de la vista **Axial**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ El corte de la vista **Axial** se ajusta conforme a la posición de la línea de referencia axial en la vista **Panorámica**.
5. Cuando la línea de referencia axial se encuentre en las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ La vista **Axial** mantiene el corte actual.

DESPLAZAR EL ÁREA PANORÁMICA

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el área panorámica.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo desplaza el área panorámica según la posición del puntero del ratón.
4. Cuando la curva central del área panorámica siga a las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El área panorámica mantiene su posición actual.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
4. Cuando las raíces de los dientes de la mandíbula sigan a la curva central del área panorámica, suelte el botón izquierdo del ratón.

AJUSTAR TAMAÑO, FORMA Y GROSOR DEL ÁREA PANORÁMICA



1. Seleccione la **Tamaño** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Tamaño** correspondiente.



2. Seleccione la **Forma** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Forma** correspondiente.



3. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de proyección. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.



4. Seleccione el **Grosor** del área panorámica desplazando la corredera **Grosor**. Asegúrese de que el área panorámica contenga por completo todos los dientes y los dos maxilares. Mantenga un grosor lo más bajo posible.

5. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.

► SICAT Endo guarda la alineación de volumen ajustada y el área panorámica ajustada y muestra la vista **Panorámica** correspondiente.

Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:



- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [► *Página 77 - SIDEXIS 4*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Endo sincroniza el zoom entre las vistas, exceptuando la vista **Axial**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica, puede hacer clic en el botón **Restablecer**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.

25 IMPRESIONES ÓPTICAS



Solo puede importar y registrar impresiones ópticas de datos radiográficos que se hayan generado con equipos de rayos X 3D de Sirona.

SICAT Endo puede mostrar simultáneamente datos radiográficos e impresiones ópticas concordantes del mismo paciente. La visualización combinada ofrece información adicional para el análisis y el diagnóstico. Además, la implementación de la terapia se basa en las impresiones ópticas.

Para utilizar datos con impresiones ópticas en SICAT Endo son necesarias las siguientes acciones:

- Registro de impresiones ópticas en datos radiográficos.

SICAT Endo admite los siguientes formatos de archivo para impresiones ópticas:

- Archivos SIXD que contengan una impresión óptica del maxilar y una impresión óptica de la mandíbula
- Archivos SSI que contengan una impresión óptica del maxilar y una impresión óptica de la mandíbula
- Archivos STL que contengan una impresión óptica del maxilar o una impresión óptica de la mandíbula (se requiere licencia de **SICAT Suite STL Import**)

Las siguientes herramientas están disponibles para las impresiones ópticas:

- *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 104 - SIDEXIS 4*]
- *Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT* [▶ *Página 111 - SIDEXIS 4*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: encontrará información sobre ello en Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*].
- *Enfocar impresiones ópticas y eliminar impresiones ópticas: encontrará más información al respecto en Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].

Las impresiones ópticas en formato STL requieren pasos adicionales al importar. Encontrará información sobre ello en *Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL* [▶ *Página 110 - SIDEXIS 4*].

25.1 IMPORTAR Y REGISTRAR IMPRESIONES ÓPTICAS


PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.


PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.


PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.


PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.


PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.


PRECAUCIÓN

Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.


PRECAUCIÓN

La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.


PRECAUCIÓN

Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.



Puede utilizar la **Ventana explor** para comprobar si una impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos. Puede desplazar la **Ventana explor** y desplazarse por los cortes en la **Ventana explor**.

Encontrará información general sobre las impresiones ópticas en *Impresiones ópticas* [▶ *Página 103 - SIDEXIS 4*].


Para importar y registrar una impresión óptica, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
- Haga clic en el botón **Examinar**.
 - ▶ Se abre la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**.
- En la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**, vaya al archivo con una impresión óptica que desee, selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
 - ▶ La ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas** se cierra.


► SICAT Endo abre el archivo con la impresión óptica seleccionado:

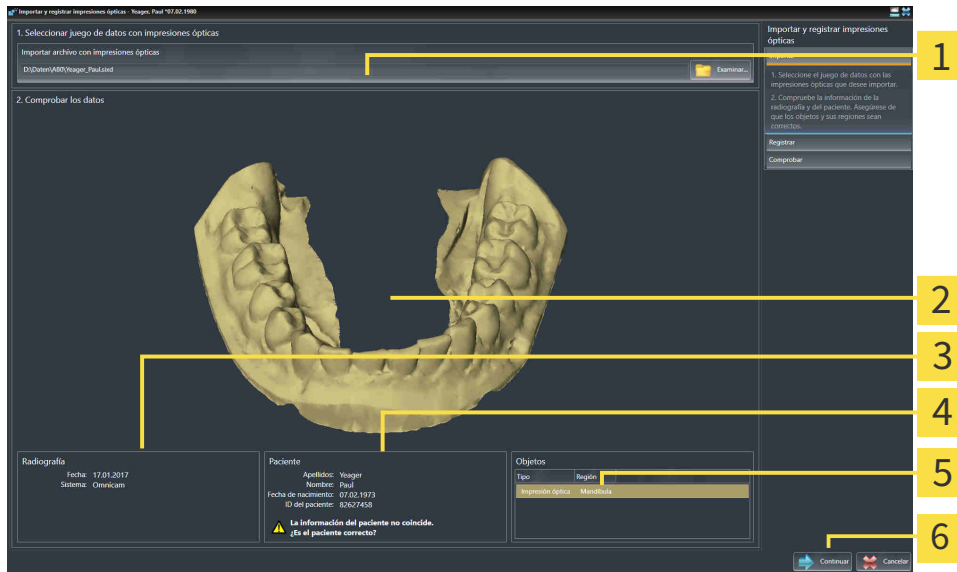

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Área Importar archivo con impresiones ópticas | 4 Información del paciente |
| 2 3D Vista de la impresión óptica | 5 Lista de objetos |
| 3 Información de la radiografía | 6 Botón Continuar |


4. Compruebe la información de la radiografía y la información del paciente.
5. Asegúrese de que los objetos y sus regiones sean correctos. El color de fondo de la lista de objetos se corresponde con el color de los objetos de la vista **3D**.
6. Haga clic en **Continuar**.

- Si los datos de los pacientes son diferentes en la radiografía 3D y en la impresión óptica, SICAT Endo abre la ventana **Información del paciente diferente**:

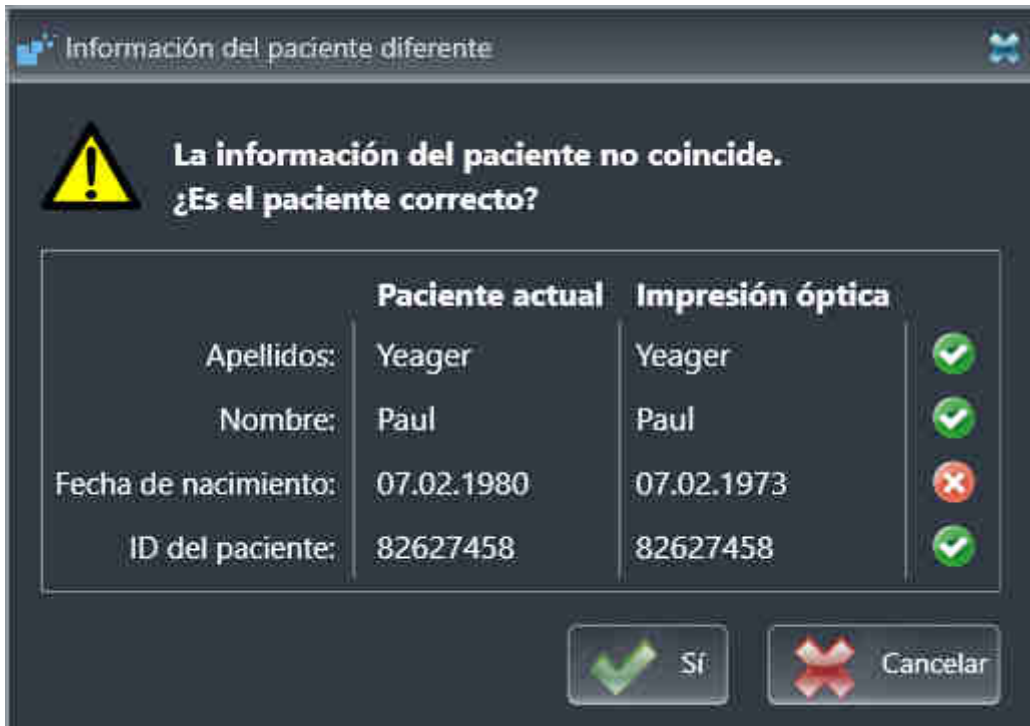


- 7. Compare los datos de los pacientes. Si está seguro de que la impresión óptica coincide con el paciente actual, haga clic en el botón **Sí**.

- El paso **Registrar** se abre:

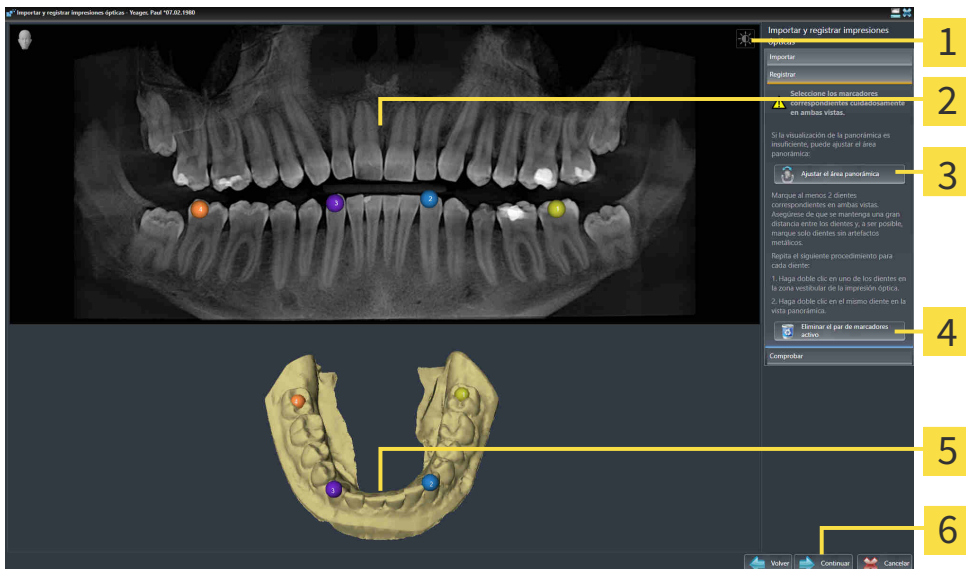

- | | |
|--|--|
| 1 Símbolo Ajustar brillo y contraste | 4 Botón Eliminar el par de marcadores activo |
| 2 Panorámica Vista | 5 3D Vista que muestra la impresión óptica |
| 3 Botón Ajustar el área panorámica | 6 Botón Continuar |

8. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el mismo diente para la impresión óptica tanto en la vista **Panorámica** como en la cara vestibular de la impresión óptica en la vista **3D**. Asegúrese de que se mantenga una gran distancia entre los dientes y marque solo dientes sin artefactos metálicos. Repita este paso hasta que se hayan identificado al menos dos dientes coincidentes en ambas vistas.
 - ▶ Las marcas con distintos colores y números en ambas vistas indican los dientes asignados en la impresión óptica.
9. Haga clic en **Continuar**.
 - ▶ SICAT Endo calcula el registro de la impresión óptica con los datos radiográficos.
 - ▶ El paso **Comprobar** se abre:

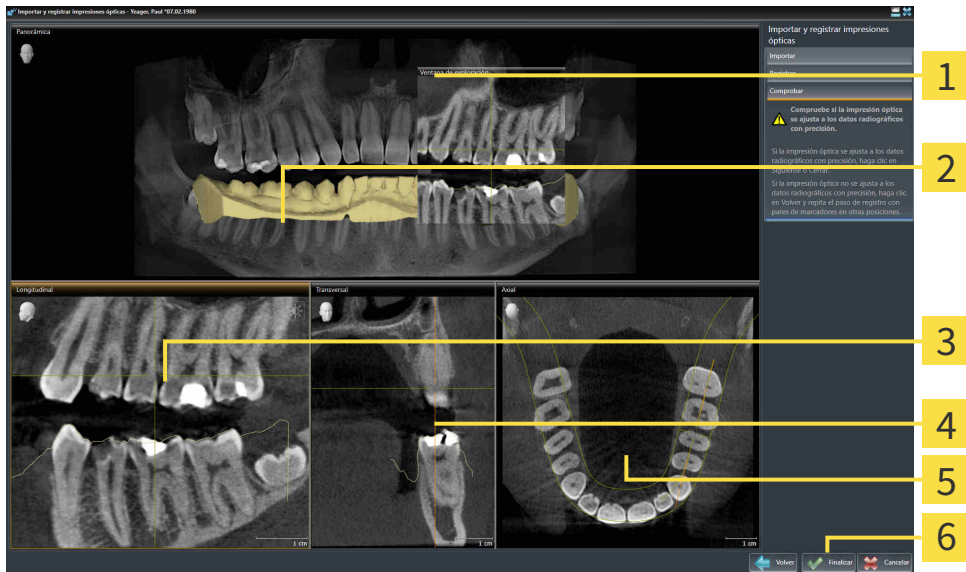

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Panorámica Vista | 4 Transversal Vista |
| 2 Ventana explor | 5 Axial Vista |
| 3 Longitudinal Vista | 6 Botón Finalizar |

10. En las vistas de corte 2D, compruebe si la impresión óptica se ajusta a los datos radiográficos con precisión. Desplácese por los cortes y compruebe los contornos mostrados.
11. Si la impresión óptica no se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Volver** y repita el paso **Registrar** con los pares de marcadores en otras posiciones.
12. Si la impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ SICAT Endo añade la impresión óptica seleccionada al **Navegador de objetos**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la impresión óptica registrada.



Además del procedimiento descrito, en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 77 - SIDEXIS 4*].
- Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 100 - SIDEXIS 4*].
- Si desea eliminar un par de marcadores determinado en el paso **Registrar**, seleccione uno de los marcadores del par y haga clic en el botón **Eliminar el par de marcadores activo**.
- Si desea cancelar la importación y el registro de impresiones ópticas, haga clic en **Cancelar**.

25.2 PASOS ADICIONALES PARA LAS IMPRESIONES ÓPTICAS EN FORMATO STL

Los archivos STL no contienen información sobre la posición y la orientación de las impresiones ópticas. Por ello, debe adaptar la posición y la orientación en caso necesario:

Ha activado ya una licencia **SICAT Suite STL Import**.

1. Abra las impresiones ópticas desde un archivo en formato STL. Encontrará información sobre ello en Importar y registrar impresiones ópticas.

► Se abre la ventana **STL Import-Assistent**:



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Selección del maxilar | 3 Cambio del lado interno y el externo |
| 2 Cambio de orientación | 4 Botón OK |

2. En el área **Maxilar**, seleccione si la impresión óptica contiene el **maxilar** o la **mandíbula** haciendo clic en el símbolo correspondiente.



3. Si es necesario, modifique la orientación de las impresiones ópticas para un posicionamiento previo aproximado haciendo clic en los símbolos de las flechas o los símbolos de rotación en el área **Orientación**.

4. Si es necesario, cambie el lado interno y externo de las impresiones ópticas haciendo clic en la representación de las impresiones ópticas en el área **Parámetros**.

5. Haga clic en el botón **OK**.

6. Si es necesario, repita los pasos para un segundo archivo STL. SICAT Endo asigna automáticamente el segundo archivo STL al otro maxilar.

► SICAT Endo muestra las impresiones ópticas importadas en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.

7. Continúe registrando las impresiones ópticas. Encontrará información sobre ello en Importar y registrar impresiones ópticas.

25.3 REUTILIZAR IMPRESIONES ÓPTICAS PROCEDENTES DE OTRAS APLICACIONES SICAT



PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.



PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.



PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.



PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.



PRECAUCIÓN

Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.

Encontrará información general sobre las impresiones ópticas en *Impresiones ópticas* [► *Página 103 - SIDEXIS 4*].

Para reutilizar impresiones ópticas procedentes de otra aplicación SICAT, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.

- ☑ Tiene un estudio abierto en otra aplicación SICAT y ya ha importado a él impresiones ópticas que todavía no está utilizando en SICAT Endo.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
2. En el área **Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT**, haga clic en la línea donde estén las impresiones ópticas que desee.
3. SICAT Endo muestra las impresiones ópticas seleccionadas:
4. Compruebe la información de la radiografía y la información del paciente. Asegúrese de que los objetos y sus regiones sean correctos. El color de fondo de la lista de objetos se corresponde con el color de los objetos de la vista **3D**.
5. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ SICAT Endo añade las impresiones ópticas seleccionadas al **Navegador de objetos**.
 - ▶ SICAT Endo muestra las impresiones ópticas seleccionadas:

Si desea cancelar la importación de impresiones ópticas de otra aplicación SICAT, haga clic en **Cancelar**.

26 RADIOGRAFÍAS INTRAORALES



PRECAUCIÓN

Los dispositivos para radiografías intraorales no aprobados como productos médicos podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de utilizar para las radiografías intraorales únicamente dispositivos aprobados como productos médicos.



PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de las radiografías intraorales importadas.



PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que las radiografías intraorales se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D.



PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no coincidan con el paciente ni con la radiografía 3D o cuyo momento de adquisición diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que, en una radiografía intraoral, coincidan el paciente y la radiografía 3D, y de que el momento de adquisición no diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D.



PRECAUCIÓN

Una calidad insuficiente de las radiografías intraorales o las radiografías 3D podrían conllevar que el mecanismo de registro de las radiografías intraorales fallara.

Utilice únicamente radiografías intraorales y radiografías 3D que permitan un registro correcto.



PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente radiografías intraorales que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.



PRECAUCIÓN

Una posición u orientación incorrecta de las radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Después del registro, compruebe la correcta posición y orientación de las radiografías intraorales con los dientes en la radiografía 3D.



Una orientación incorrecta de las radiografías intraorales en relación con las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Compruebe que las radiografías intraorales registradas estén correctamente adaptadas a la radiografía 3D.
2. En caso necesario, gire las radiografías intraorales para orientarlas correctamente.



Una asignación incorrecta de los números de dientes podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que coincidan los números de dientes seleccionados y los números de dientes anatómicos reales.

Puede utilizar radiografías intraorales en SICAT Endo para preparar el diagnóstico y planificar el tratamiento. Las radiografías intraorales pueden importarse y administrarse en la ventana **Radiograph Manager**.

Para utilizar radiografías intraorales en SICAT Endo son necesarias las siguientes acciones:

- Importación de archivos DICOM que contengan radiografías intraorales
- Asignación de números de dientes a las radiografías intraorales
- Registro de las radiografías intraorales

SICAT Endo compatible con el siguiente formato de archivos para las radiografías intraorales:

- Datos DICOM presentes como archivos Single-Frame

Encontrará una lista de sistemas de adquisición compatibles en *Sensores de radiografías intraorales compatibles* [▶ *Página 115 - SIDEXIS 4*].

Para las radiografías intraorales están disponibles las siguientes acciones:

- *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 116 - SIDEXIS 4*]
- *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ *Página 121 - SIDEXIS 4*]
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 123 - SIDEXIS 4*]

26.1 SENSORES DE RADIOGRAFÍAS INTRAORALES COMPATIBLES

SICAT Endo compatible con los siguientes sensores de radiografías intraorales:

- XIOS XG Supreme, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- XIOS XG Select, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- XIOS Plus, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- Schick 33, fabricante: Sirona Dental Inc., EE. UU.
- Schick Elite, fabricante: Sirona Dental Inc., EE. UU.

26.2 IMPORTAR RADIOGRAFÍAS INTRAORALES Y ASIGNAR DIENTES

Encontrará información general sobre las radiografías intraorales en *Radiografías intraorales* [▶ *Página 113 - SIDEXIS 4*].


Para importar radiografías intraorales y asignar uno o más dientes, proceda de la siguiente manera:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 55 - SIDEXIS 4*].
- ☑ La radiografía intraoral aún no está en SICAT Endo. Puede importar cada radiografía intraoral tan solo una vez.
- ☑ La radiografía intraoral está disponible como archivo DICOM en formato Single-Frame.
- ☑ La radiografía intraoral ha sido creada con un dispositivo de radiografías intraorales compatible. Encontrará información sobre ello en *Sensores de radiografías intraorales compatibles* [▶ *Página 115 - SIDEXIS 4*].



1. Haga clic en el símbolo **Administrando y registrando radiografías intraorales**.
 - ▶ Se abre la ventana **Radiograph Manager**.
2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - ▶ Se abre la ventana **Abrir radiografía intraoral**.
3. En la ventana **Abrir radiografía intraoral**, pase al archivo deseado con radiografías intraorales y seleccione como mínimo un archivo. Puede importar varias radiografías a la vez manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** y seleccionando sucesivamente varios archivos.
4. Haga clic en **Abrir**.
 - ▶ La ventana **Abrir radiografía intraoral** se cierra.

► SICAT Endo muestra las radiografías intraorales importadas:

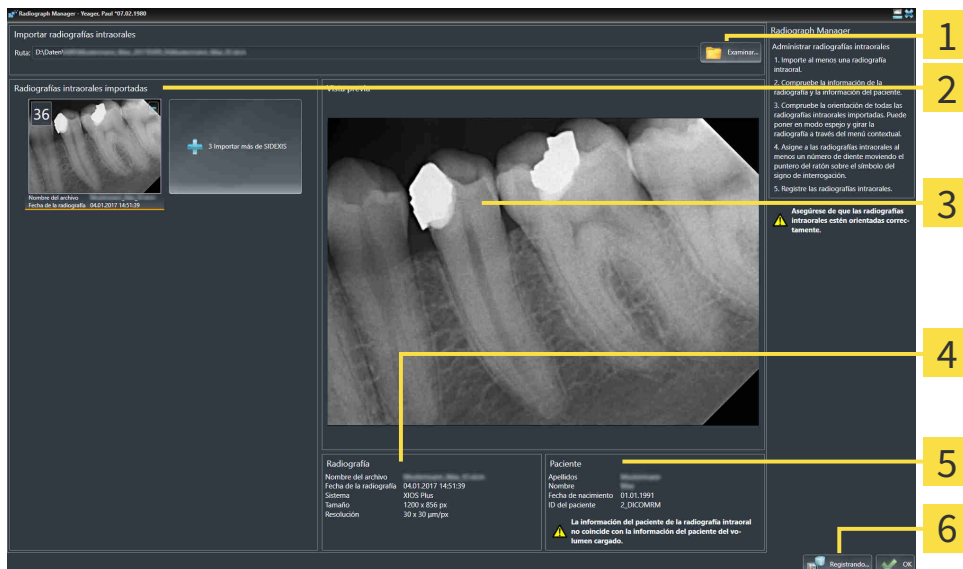

- 1** Botón **Examinar**
- 4** Información del paciente
- 2** Área **Radiografías intraorales importadas**
- 5** Información de la radiografía
- 3** Área **Vista previa**
- 6** Botón **Registrando**

5. Para seleccionar una radiografía intraoral importada, haga clic en una radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas**.
 - SICAT Endo muestra la radiografía seleccionada en el área **Vista previa**.
6. Compruebe la información sobre el paciente y la información sobre la radiografía. Asegúrese de que la radiografía y el paciente coincidan y de que los datos de la radiografía 3D y la radiografía intraoral no disten en más de 90 días.
7. Asegúrese de que la radiografía intraoral importada tenga la orientación anatómica correcta.
8. Si una radiografía intraoral importada no tiene la orientación anatómica correcta, haga clic con el ratón derecho en la radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas** y, en el menú contextual, seleccione una de las entradas **Modo espejo horizontal**, **Modo espejo vertical**, **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj** o **Girar en el sentido de las agujas del reloj**.
 - SICAT Endo refleja la radiografía en el eje horizontal o vertical de la imagen.
 - SICAT Endo gira la radiografía en pasos de 90 grados a la izquierda o a la derecha.
9. Mueva el puntero del ratón por el símbolo de interrogación en una radiografía.



► Se abre la ventana **Número de diente:**



10. Asigne hasta cuatro números de dientes a la radiografía haciendo clic sucesivamente en los números de dientes anatómicamente correctos.

11. Para cerrar la ventana **Número de diente**, posicione el puntero del ratón fuera de la ventana.

► SICAT Endo cierra la ventana **Número de diente**.

► SICAT Endo muestra los números de dientes asignados en las radiografías intraorales.

► SICAT Endo guarda los cambios realizados al salir del Radiograph Manager.



Para importar radiografías intraorales de SIDEXIS 4, en el área **Radiografías intraorales importadas** haga clic en el botón **Importar más de SIDEXIS**. El botón **Importar más de SIDEXIS** muestra cuántas radiografías intraorales puede importar de SIDEXIS 4.



En el área **Radiografías intraorales importadas** puede activar las siguientes funciones a través del menú contextual:

- **Modo espejo horizontal**
- **Modo espejo vertical**
- **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj**
- **Girar en el sentido de las agujas del reloj**
- **Número de diente**
- **Registrando**
- **Eliminar**



Para eliminar radiografías intraorales importadas del área **Radiografías intraorales importadas**, tiene las siguientes posibilidades:

- Haga clic en el símbolo **Eliminar radiografía intraoral del proyecto de planificación** en una radiografía.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en una radiografía y seleccione en el menú contextual la entrada **Eliminar**.
- Marque una radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas** y pulse la tecla **Supr**.

Para registrar una radiografía intraoral importada, continúe con la siguiente sección:

- *Asistente de registro* [▶ *Página 120 - SIDEXIS 4*]

27 ASISTENTE DE REGISTRO

El asistente de registro le proporciona funciones para registrar radiografías intraorales.

Para poder utilizar el asistente de registro, deberá tener las radiografías intraorales importadas y con números de dientes asignados. Encontrará información sobre ello en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 116 - SIDEXIS 4*].

Antes de comenzar el trabajo con el asistente de registro, deberá seleccionar la radiografía intraoral que desee registrar.

En el asistente de registro puede llevar a cabo una orientación previa de la radiografía intraoral en la curva panorámica. Con la vista **Proyección en 3D** puede seguir refinando la orientación antes de que SICAT Endo registre la radiografía intraoral automáticamente.

El asistente de registro comprende los siguientes pasos:

- *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ *Página 121 - SIDEXIS 4*]
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 123 - SIDEXIS 4*]

Si no es suficiente el posicionamiento previo en la vista **Panorámica**, en el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede adaptar la orientación también a través de la vista **Transversal** o la vista **Axial**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial* [▶ *Página 126 - SIDEXIS 4*].

Si una radiografía intraoral contiene áreas que podrían causar problemas en el registro, en el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede poner una máscara de color a estas áreas y excluirlas del registro. Encontrará información sobre ello en *Poner máscaras en áreas* [▶ *Página 129 - SIDEXIS 4*].


27.1 POSICIONAR PREVIAMENTE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

Encontrará información general sobre el asistente de registro en *Asistente de registro* [► *Página 120 - SIDEXIS 4*].

En el paso **Posicionar previamente la radiografía intraoral** puede orientar la radiografía intraoral a la curva panorámica de tal manera que se dé la mejor cobertura posible entre la radiografía 3D y la radiografía intraoral.

- ✓ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 55 - SIDEXIS 4*].
- ✓ Ha importado al menos una radiografía intraoral y ha asignado al menos un número de diente a la radiografía intraoral. Encontrará información sobre ello en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [► *Página 116 - SIDEXIS 4*].

1. Haga clic en el símbolo **Administrando y registrando radiografías intraorales**.
 - Se abre la ventana **Radiograph Manager**.
2. Para seleccionar una radiografía intraoral para el registro, haga clic en ella con el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo marca la radiografía.
3. Haga clic en el botón **Registrando**.
 - El paso **Posicionar previamente la radiografía intraoral** se abre:

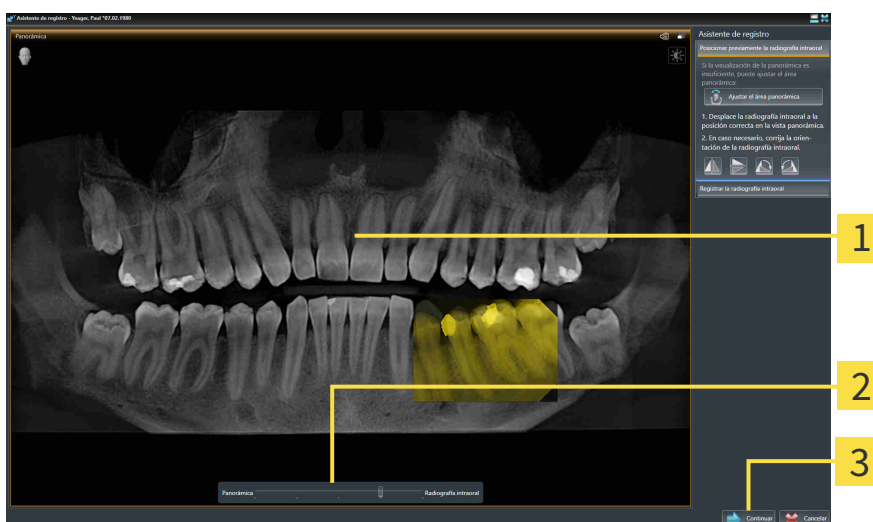

1 Ventana **Panorámica**

3 Botón **Continuar**

2 El regulador de **transparencia**

- SICAT Endo muestra en la ventana **Panorámica** la radiografía intraoral en la curva panorámica.
4. Para desplazar la radiografía intraoral, posicione el puntero del ratón en la radiografía.
 5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 6. Desplace la radiografía intraoral a la posición deseada.
 7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene la posición actual de la radiografía intraoral.

8. En caso necesario, puede adaptar la orientación de la radiografía intraoral en el área **Posicionar previamente la radiografía intraoral** a través de los botones **Modo espejo horizontal**, **Modo espejo vertical**, **Girar en el sentido de las agujas del reloj** o **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj**.
9. Para acceder al siguiente paso del registro, haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Registrar la radiografía intraoral** se abre.

Para iniciar el registro de una radiografía intraoral, de manera alternativa puede proceder de la siguiente manera:



- Haga doble clic en la radiografía intraoral en el área **Radiografías intraorales importadas**.
- Marque la radiografía intraoral en el área **Radiografías intraorales importadas** y pulse la **tecla Intro**.
- En el área **Radiografías intraorales importadas**, haga clic en la radiografía intraoral con el botón derecho del ratón y seleccione en el menú contextual la entrada **Registrando**.




Para comprobar la correcta cobertura entre la radiografía intraoral y la vista panorámica, puede adaptar la transparencia con el regulador de **transparencia**.

Continúe con *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 123 - SIDEXIS 4*].

27.2 REGISTRAR LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

Encontrará información general sobre el asistente de registro en *Asistente de registro* [► *Página 120 - SI-DEXIS 4*].

En el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede llevar a cabo un ajuste preciso de la posición inicial de la radiografía intraoral antes de llevar a cabo el registro automático.

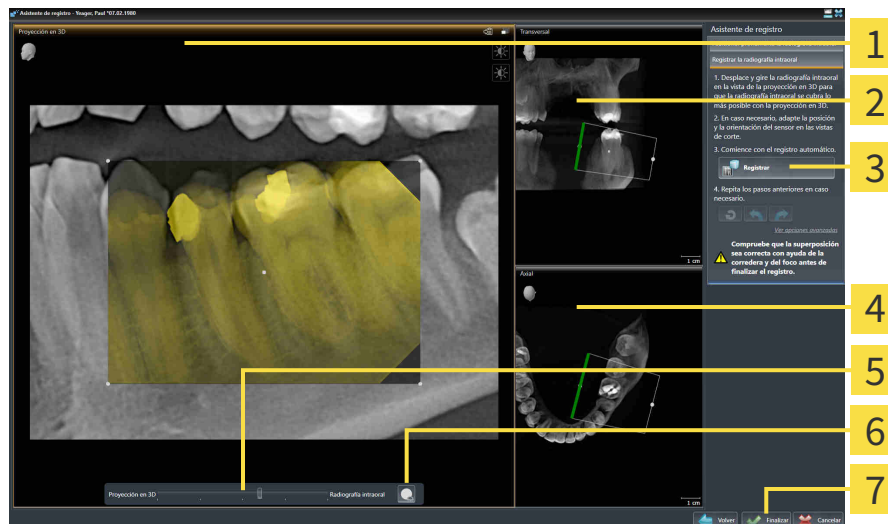

1 Proyección en 3D Vista

2 Transversal Vista

3 Botón **Registrar**

4 Axial Vista

5 El regulador de **transparencia**

6 Botón **Foco**

7 Botón **Finalizar**

Para adaptar la cobertura de la radiografía intraoral con la vista **Proyección en 3D**, haga lo siguiente:



1. En la vista **Proyección en 3D**, sitúe el puntero del ratón sobre la radiografía intraoral.
► El puntero del ratón se transforma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la radiografía intraoral a la posición deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
► SICAT Endo mantiene el giro actual de la radiografía intraoral.
► SICAT Endo adapta la vista **Transversal** y la vista **Axial** en correspondencia.



5. Para girar la radiografía intraoral, posicione el puntero del ratón en la vista **Proyección en 3D** sobre uno de los puntos de control en las esquinas de la radiografía.
► El puntero del ratón se transforma.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Gire la radiografía intraoral en la dirección deseada.

8. Suelte el botón izquierdo del ratón.

▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la radiografía intraoral.

▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal** y la vista **Axial** en correspondencia.

ENCENDER Y APAGAR EL FOCO

Para comprobar la correcta cobertura de la radiografía intraoral con la proyección en 3D, en la vista **Proyección en 3D** puede aplicar un foco.



1. Haga clic en el botón **Foco**.

2. Sitúe el puntero del ratón sobre la radiografía intraoral.

▶ SICAT Endo muestra un foco.

3. Desplace el puntero del ratón al punto que desee comprobar de la radiografía intraoral.

4. Repita este paso para todos los puntos que desee comprobar.



5. Para volver a ocultar el foco, haga clic de nuevo en el botón **Foco**.

▶ SICAT Endo oculta el foco.

ADAPTAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL O AXIAL

En caso de que no baste la orientación de la radiografía intraoral en la vista **Proyección en 3D**, puede orientar la adaptación también en la vista **Transversal** o en la vista **Axial**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial* [▶ *Página 126 - SIDEXIS 4*].

PONER MÁSCARAS EN LAS ÁREAS DE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

En caso de que desee descartar áreas determinadas de la radiografía intraoral del registro automático, puede poner una máscara de color a estas áreas. SICAT Endo no tiene en cuenta estas áreas con máscara en el registro automático. Encontrará información sobre ello en *Poner máscaras en áreas* [▶ *Página 129 - SIDEXIS 4*].

REALIZAR REGISTRO AUTOMÁTICO

- Para llevar a cabo el registro automático, en el área **Registrar la radiografía intraoral** haga clic en el botón **Registrar**.
- ▶ SICAT Endo lleva a cabo el registro de la radiografía intraoral con la radiografía 3D.
- ▶ SICAT Endo cierra el asistente de registro.
- ▶ SICAT Endo muestra el resultado del registro en la ventana **Radiograph Manager**.

COMPROBAR REGISTRO

1. Compruebe el resultado del registro con ayuda de la vista **Proyección en 3D**, la vista **Transversal** y la vista **Axial**.
2. Si no está satisfecho con el resultado, puede adaptar la posición de la radiografía intraoral desplazando la radiografía intraoral con el ratón mediante «arrastrar y soltar».
3. Para terminar el registro, haga clic en el botón **Finalizar**.

▶ El **Asistente de registro** se cierra.

▶ Se abre la ventana **Radiograph Manager**.



▶ SICAT Endo muestra la radiografía intraoral como registrada en el área **Radiografías intraorales importadas** del **Radiograph Manager**.



Para comprobar la correcta cobertura entre la radiografía intraoral y la vista panorámica, puede adaptar la transparencia con el regulador de **transparencia**.



Para restablecer la última adaptación realizada, haga clic en el botón **Deshacer último paso**. Para restablecer todas las adaptaciones realizadas, haga clic en el botón **Deshacer todos los pasos**.


27.3 ADAPTAR LA ORIENTACIÓN PREVIA EN LA VISTA TRANSVERSAL Y AXIAL

Encontrará información general sobre la adaptación de la superposición de la radiografía intraoral con la proyección en 3D en *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 123 - SIDEXIS 4*].

Incluso si puede orientar la radiografía intraoral de forma anatómicamente correcta en la vista **Proyección en 3D**, en determinadas radiografías SICAT Endo no podría ser capaz de realizar el registro automático de la radiografía intraoral con la radiografía 3D.

Adapte en este caso el posicionamiento de la radiografía intraoral en la vista **Transversal** o en la vista **Axial**:

DESPLAZAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL

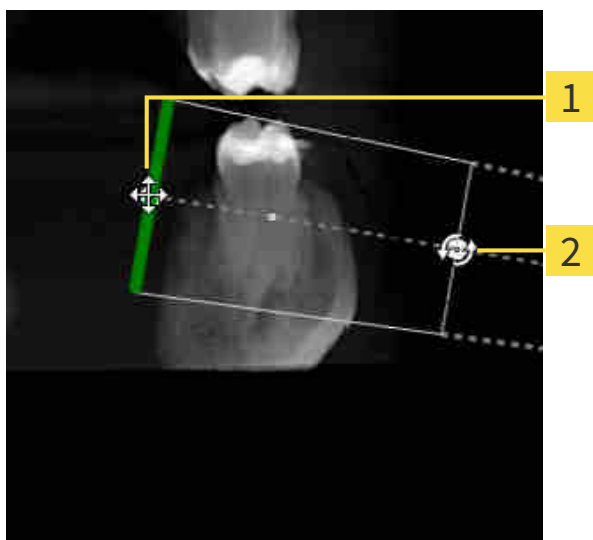

1 Punto de control **Uno**


2 Punto de control **Dos**

1. Para desplazar la orientación del aparato de rayos X y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Uno**.
 - El puntero del ratón se visualiza como una cruz con cuatro flechas.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Axial** en correspondencia.

GIRAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL

1. Para girar la orientación del aparato de rayos C y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Dos**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un círculo con dos flechas girándose.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Gire la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Axial** en correspondencia.

DESPLAZAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA AXIAL

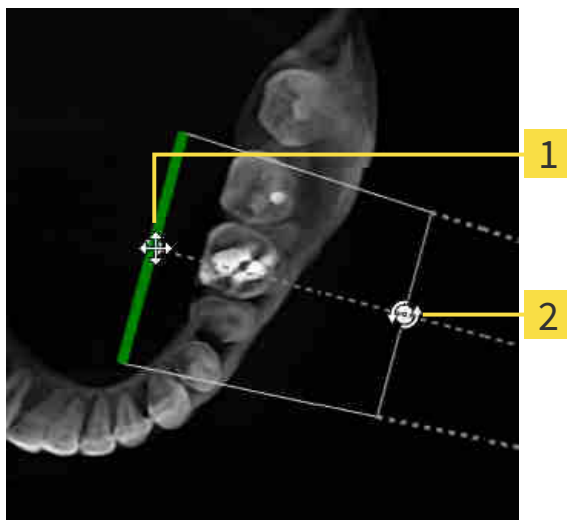

1 Punto de control **Uno**

2 Punto de control **Dos**

1. Para desplazar la orientación del aparato de rayos X y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Uno**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz con cuatro flechas.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Transversal** en correspondencia.

GIRAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA AXIAL

1. Para girar la orientación del aparato de rayos C y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Axial** sobre el punto de control **Dos**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un círculo con dos flechas girándose.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Gire la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Transversal** en correspondencia.

27.4 PONER MÁSCARAS EN ÁREAS

Una radiografía intraoral puede contener áreas que podrían causar problemas en el registro automático. Por ejemplo:

- Artefactos metálicos
- Dientes del maxilar opuesto
- Bordes de la radiografía intraoral que no pertenecen a la radiografía


Para evitar problemas en el registro automático, puede poner máscaras en estas áreas. SICAT Endo excluye todas las áreas con máscara del registro automático.

Para poner máscaras en áreas concretas de una radiografía intraoral, proceda de la siguiente manera:

1. Haga clic en el botón **Ver opciones avanzadas** del área **Registrar la radiografía intraoral**.
▶ SICAT Endo muestra el botón **Editar máscara**.



2. Haga clic en el botón **Editar máscara**.
▶ SICAT Endo muestra la barra de herramientas de las máscaras en el borde derecho de la radiografía intraoral:

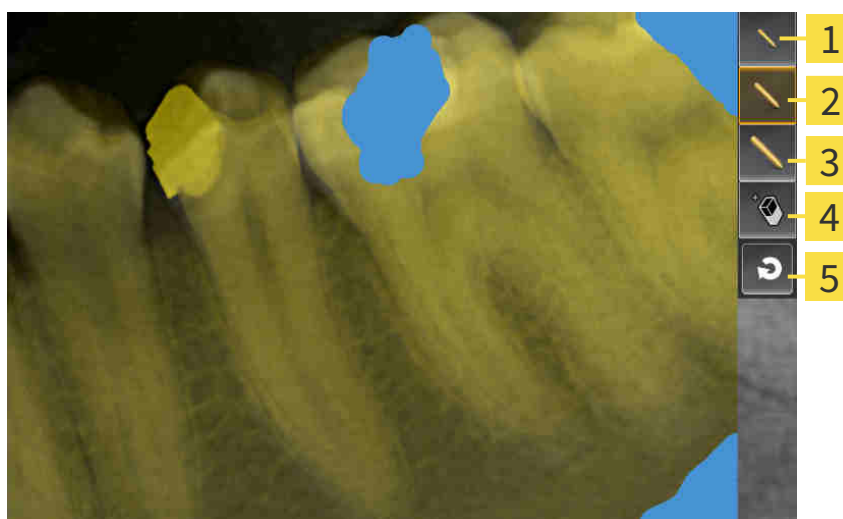

1 Botón **Utilizar el pincel pequeño**

4 Botón **Utilizar goma**

2 Botón **Utilizar el pincel mediano**

5 Botón **Restablecer máscara**

3 Botón **Utilizar el pincel grande**

3. Para colorear un área, haga clic en el botón **Utilizar el pincel pequeño**, el botón **Utilizar el pincel mediano** o el botón **Utilizar el pincel grande**.
▶ El puntero del ratón se transforma en un círculo.
4. Sitúe el puntero del ratón en el área que desee colorear de la radiografía intraoral.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
6. Mueva el puntero del ratón por el área que desee colorear.

7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el área marcada de color azul.
8. Repita los pasos en caso necesario para poner máscaras en otras áreas de la radiografía intraoral.
9. Para eliminar un área marcada de azul, haga clic en el botón **Utilizar goma**.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma en una goma.
10. Haga clic en el área marcada en azul que desee eliminar con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo elimina el área marcada de la radiografía intraoral.
11. Para eliminar todas las marcas realizadas, haga clic en el botón **Restablecer máscara**.
 - ▶ SICAT Endo elimina todas las áreas marcadas de azul de la radiografía intraoral.
12. En el área **Registrar la radiografía intraoral**, haga clic en el botón **Finalizar edición** para aplicar los cambios realizados.
 - ▶ SICAT Endo muestra el área con la máscara en la vista **Proyección en 3D**.
 - ▶ SICAT Endo excluye las áreas con máscara del registro automático.



Para volver a ocultar el botón **Editar máscara**, en el área **Registrar la radiografía intraoral** haga clic en el botón **Ocultar opciones avanzadas**.

28 ASISTENTE DE ENDOLINE

El asistente de EndoLine le proporciona funciones para el diagnóstico y la planificación del tratamiento.

Puede ejecutar de manera opcional las siguientes opciones antes de utilizar el asistente de EndoLine:

- *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 116 - SIDEXIS 4*].
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 123 - SIDEXIS 4*]
- *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [▶ *Página 139 - SIDEXIS 4*]

En el asistente de EndoLine puede determinar con ayuda de una línea de corte el área que desee tratar. En esta área puede colocar EndoLines en los canales de las raíces.

Los EndoLines son líneas de medición que puede utilizar para marcar el canal de la raíz a tratar y localizar las puntas de las raíces. Los EndoLines sirven de base para la planificación y colocación de canales de perforación.

Para visualizar los EndoLines, SICAT Endo usa diferentes vistas. Encontrará información sobre ello en *Vistas en el asistente de EndoLine* [▶ *Página 132 - SIDEXIS 4*].

SICAT Endo asigna al diente seleccionado todos los objetos que cree durante la planificación. Estos objetos pueden ser EndoLines o canales de perforación. Puede administrar y editar estos objetos en el área de trabajo **Panorámica** y en el área de trabajo **Radiografía intraoral**, así como en el **Navegador de objetos**.

Para ver los objetos creados, en SICAT Endo tiene diferentes vistas y composiciones de vistas en áreas de trabajo. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 65 - SIDEXIS 4*].

El asistente de EndoLine comprende los siguientes pasos:

- *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 140 - SIDEXIS 4*]
- *Colocar EndoLines* [▶ *Página 142 - SIDEXIS 4*]
- *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 151 - SIDEXIS 4*]


28.1 VISTAS EN EL ASISTENTE DE ENDOLINE

En cada paso del asistente de EndoLine hay disponibles diferentes vistas.

Encontrará información general sobre la adaptación de las vistas en *Ajustar las vistas* [► *Página 73 - SIDEXIS 4*] y *Adaptar la vista 3D* [► *Página 86 - SIDEXIS 4*].

PASO «ORIENTAR PREVIAMENTE LA REGIÓN DENTAL»

En el paso **Orientar previamente la región dental** están disponibles las siguientes vistas:

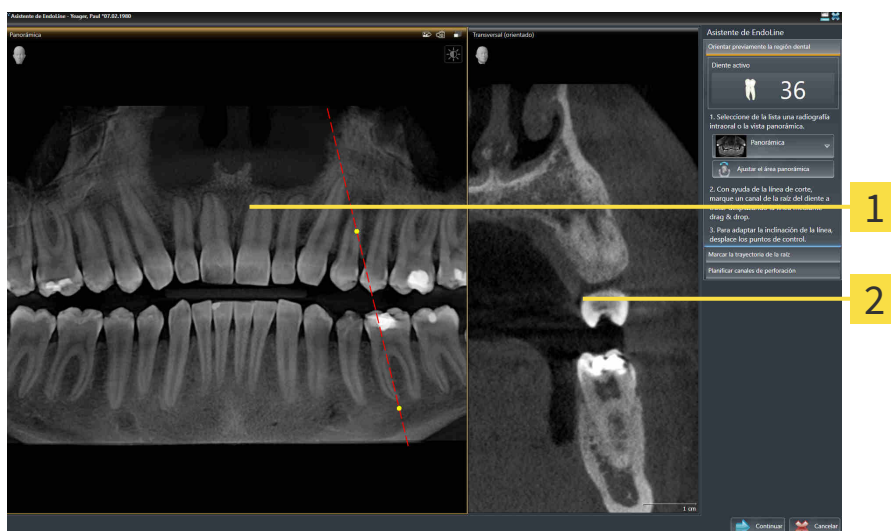

1 **Panorámica** Vista o vista **Radiografía intraoral**


2 Vista **Transversal (orientado)**

En la vista **Panorámica** o la vista **Radiografía intraoral** puede orientar previamente la vista del canal de la raíz a tratar con ayuda de una línea de corte. La vista **Radiografía intraoral** solo está disponible si ha registrado al menos una radiografía intraoral para el diente activo. Encontrará información para seleccionar un diente activo en *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [► *Página 139 - SIDEXIS 4*].

En la vista **Transversal (orientado)** se muestra el diente marcado en la vista **Panorámica** o en la vista **Radiografía intraoral** desde el lateral y alineado con la línea de corte establecida.

PASO «COLOCAR ENDOLINES»

En el paso **Colocar EndoLines** están disponibles las siguientes vistas:

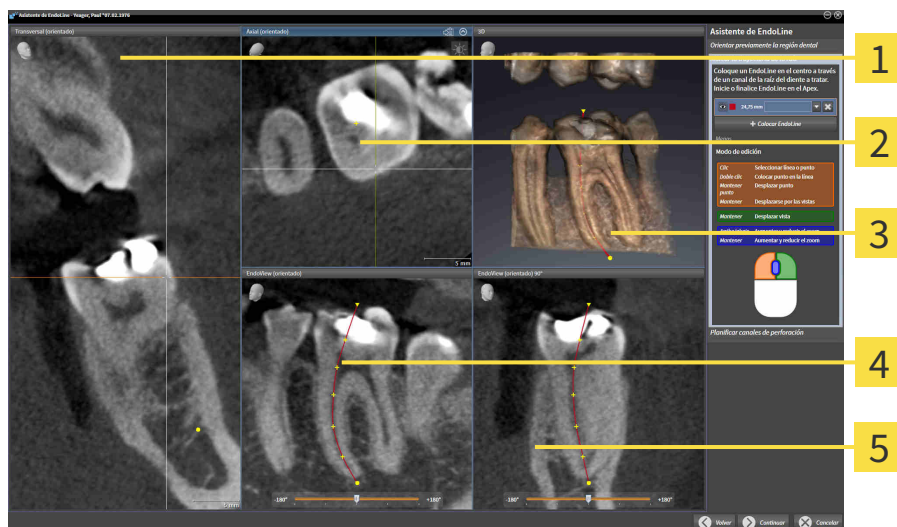

1 Vista **Transversal (orientado)**

2 Vista **Axial (orientado)**

3 **3DVista**

4 Vista **EndoView (orientado)**

5 Vista **EndoView (orientado) 90°**

La vista **Transversal (orientado)** en el paso **Colocar EndoLines** se corresponde con la vista **Transversal (orientado)** del paso **Orientar previamente la región dental**. Muestra el diente marcado en el paso **Orientar previamente la región dental** en diagonal desde fuera hacia dentro y orientado a la línea de corte establecida.


La vista **Axial (orientado)** muestra desde arriba el diente orientado a la línea de corte establecida y marcado en el paso **Orientar previamente la región dental**.

La vista **3D** muestra el EndoLine en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 86 - SIDEXIS 4*].

La **EndoView (orientado)** es una vista alineada con el EndoLine que muestra el EndoLine seleccionado proyectado a un nivel 2D. El **EndoView (orientado) 90°** es el **EndoView (orientado)** girado en 90 grados. Las dos vistas solo se muestran una vez que haya colocado un EndoLine. Encontrará más información sobre EndoView en *EndoView* [► *Página 137 - SIDEXIS 4*].

PASO «PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN»

En el paso **Planificar canales de perforación** están disponibles las siguientes vistas:

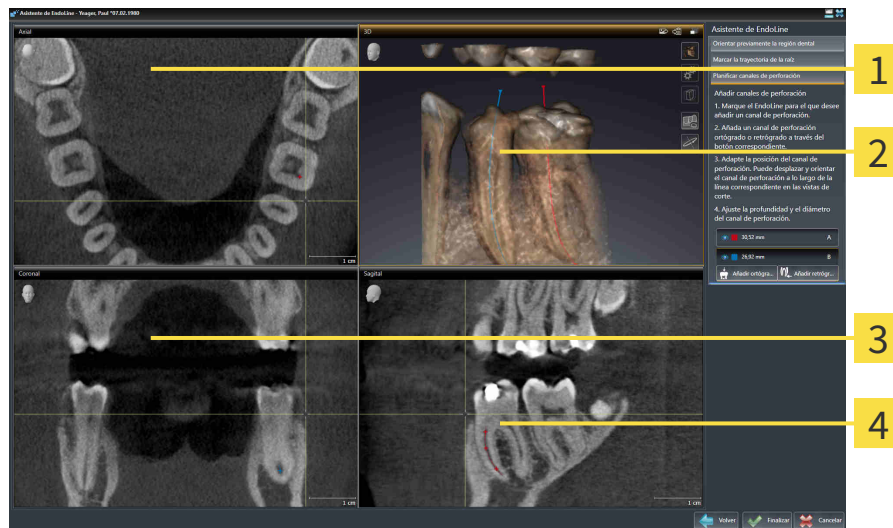

1 AxialVista

3 CoronalVista

2 3DVista

4 SagitalVista

La vista **Axial** muestra el EndoLine desde arriba.

La vista **3D** muestra el EndoLine en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 86 - SIDEXIS 4*].

La vista **Coronal** muestra el EndoLine desde delante.


La vista **Sagital** muestra el EndoLine desde la derecha.



Si aún no ha planificado ningún canal de perforación, SICAT Endo mostrará al abrir el corte **Planificar canales de perforación** en el asistente de EndoLine la vista **Axial**, la vista **3D**, la vista **Coronal** y la vista **Sagital**.

VISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE CANALES DE PERFORACIÓN ORTÓGRADOS

En la planificación de los canales de perforación ortógrados están disponibles las siguientes vistas:

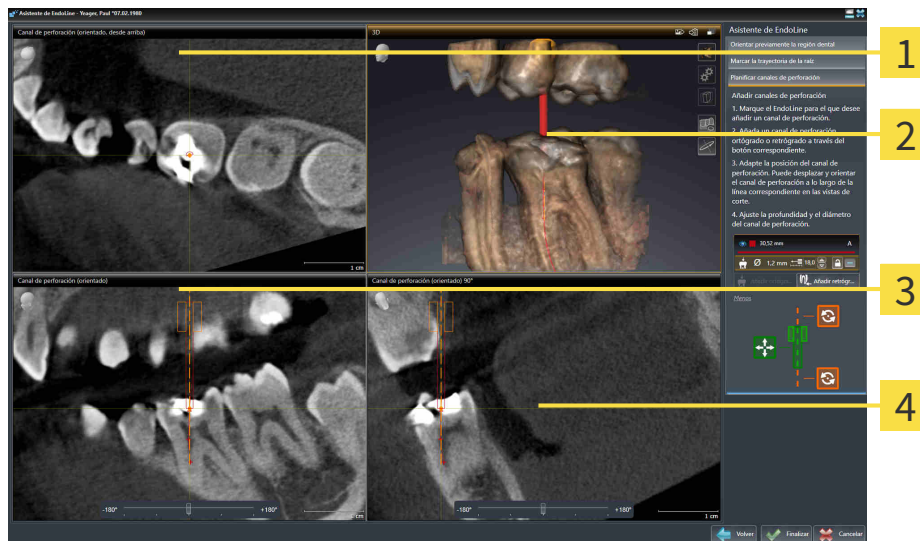

1 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

2 3DVista

3 Vista **Canal de perforación (orientado)**

4 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

La vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde arriba.


La vista **3D** muestra el canal de perforación establecido en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 86 - SIDEXIS 4*].

La vista **Canal de perforación (orientado)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde delante.

La vista **Canal de perforación (orientado) 90°** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde un lateral.

VISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE CANALES DE PERFORACIÓN RETRÓGRADOS

En la planificación de los canales de perforación retrógrados están disponibles las siguientes vistas:

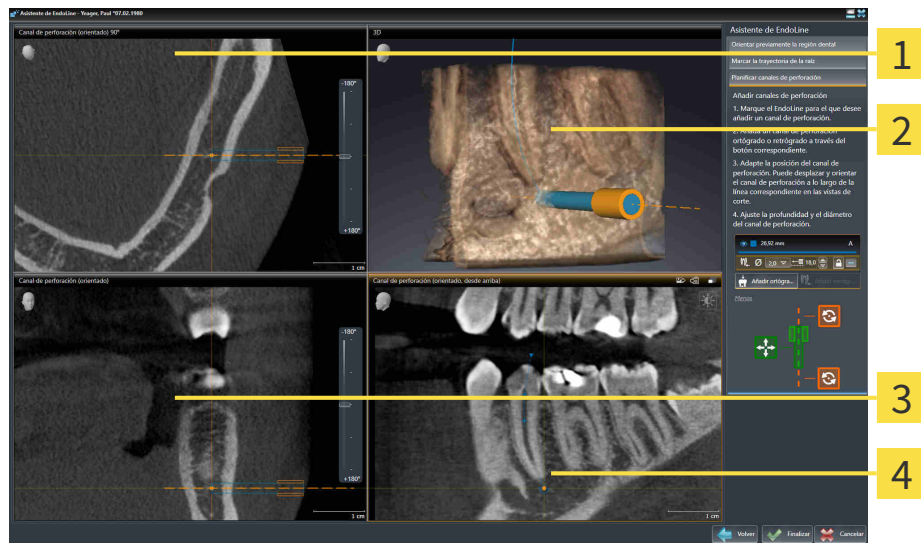

1 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

3 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 **3D**Vista

4 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

La vista **Canal de perforación (orientado) 90°** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde un lateral.


La vista **3D** muestra el canal de perforación establecido en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► [Página 86 - SIDEXIS 4](#)].

La vista **Canal de perforación (orientado)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde delante.

La vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde arriba.

28.1.1 ENDOVIEW

El software del EndoView de SICAT Endo visualiza la anatomía de las estructuras dentales complejas de un paciente proyectando y mostrando un EndoLine torcido de una radiografía 3D en un nivel 2D. Esta técnica se llama Curved Planar Reformation (CPR). Permite mostrar las estructuras torcidas desplegadas.

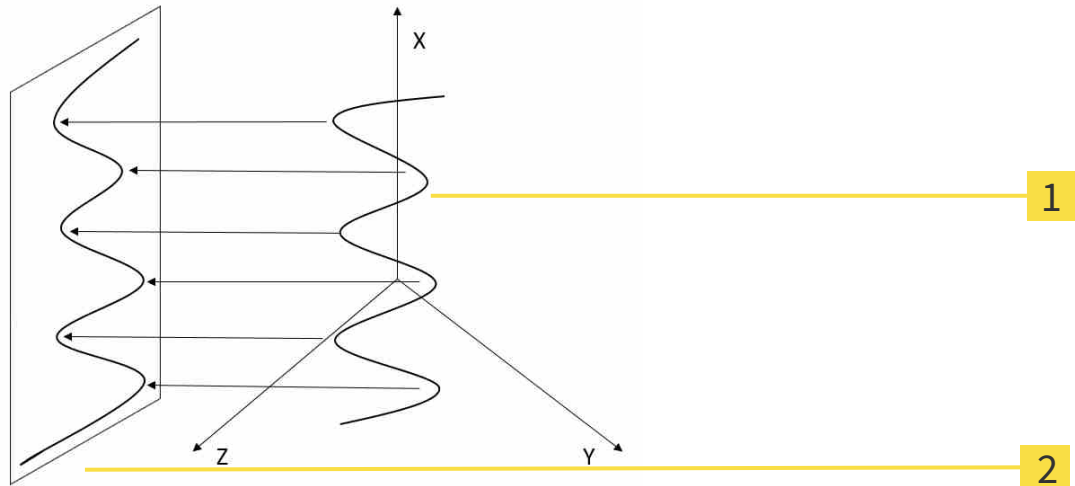

1 Radiografía 3D

2 Nivel 2D

Mediante la representación de un EndoLine en el nivel 2D, puede comprender las estructuras dentales anatómicas al detalle y detectar más fácilmente las anomalías. Al mismo tiempo, el EndoView ayuda a mejorar la precisión de las decisiones de diagnóstico y facilita la creación de un plan de tratamiento individual para el paciente.

28.1.2 GIRAR ENDOVIEW

Encontrará información general sobre el EndoView en *EndoView* [▶ *Página 137 - SIDEXIS 4*].

En las vistas **EndoView (orientado)** y **EndoView (orientado) 90°** puede utilizar una corredera para girar las secciones de las imágenes.

- ☑ El paso **Colocar EndoLines** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Colocar EndoLines* [▶ *Página 142 - SIDEXIS 4*].
- ☑ Ha establecido al menos un EndoLine.
- ☑ Ha seleccionado un EndoLine.

1. Active la vista **EndoView (orientado)** o la vista **EndoView (orientado) 90°** haciendo clic en la vista deseada.

▶ SICAT Endo activa la vista.



2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Desplace la corredera a la posición deseada.
5. Suelte el botón del ratón.

▶ SICAT Endo gira la sección de la imagen

▶ SICAT Endo adapta la vista **EndoView (orientado)** y la vista **EndoView (orientado) 90°**.



De manera alternativa, también puede girar la sección de la imagen haciendo clic en cualquier punto de **EndoView (orientado)** o de **EndoView (orientado) 90°** con el botón izquierdo del ratón y girar la sección de la imagen en la dirección deseada con el botón izquierdo del ratón pulsado.



El área de la corredera va de -180 grados a +180 grados y está dividida en pasos de 90 grados. Con ayuda de la corredera, puede ajustar un ángulo para el giro de la vista.


28.2 SELECCIONAR EL DIENTE PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Para poder planificar EndoLines y canales de perforación, deberá seleccionar el diente que desee tratar.

- ☑ Ha abierto el área de trabajo **Radiografía intraoral** o el área de trabajo **Panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 65 - SIDEXIS 4*].



1. En la **Barra de objetos**, mueva el puntero del ratón por el área **Diente activo**.
 - ▶ Se abre la ventana **Número de diente**:

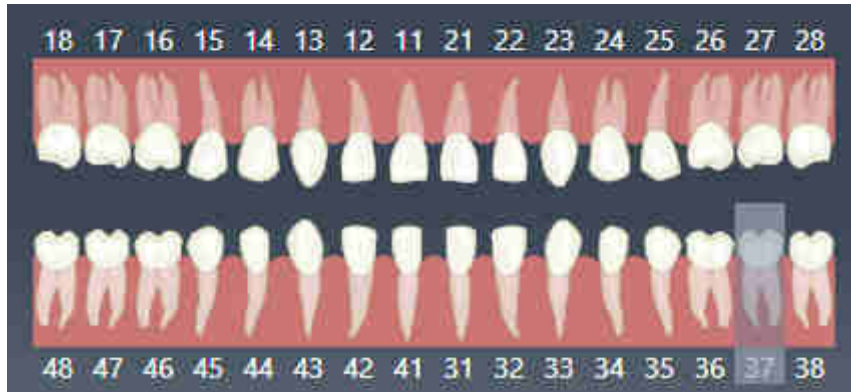

2. Mueva el puntero del ratón por encima del diente que desee tratar.
 - ▶ SICAT Endo destaca el número de diente.
3. Para seleccionar el diente destacado, haga clic en el diente con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo marca el diente en azul.
 - ▶ SICAT Endo Muestra el número de diente en la **Barra de objetos**, en el área **Diente activo**.
4. Para cerrar la ventana **Número de diente**, saque el puntero del ratón del área **Diente activo**.
 - ▶ SICAT Endo cierra la ventana **Número de diente**.

28.3 ORIENTAR PREVIAMENTE LA REGIÓN DENTAL

Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 131 - SIDEXIS 4*].


En el paso **Orientar previamente la región dental**, con ayuda de una línea de corte puede adaptar las vistas de tal manera que pueda ver bien el diente y las raíces que desee tratar.

- ☑ En el área de trabajo **Radiografía intraoral** o en el área e trabajo **Panorámica**, ha seleccionado el diente que deseaba tratar mediante el esquema **Número de diente** en la **Barra de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [► *Página 139 - SIDEXIS 4*].
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 55 - SIDEXIS 4*].



1. Haga clic en el símbolo **Planificando el tratamiento de la raíz con ayuda de EndoLines y canales de perforación**.

► El paso **Orientar previamente la región dental** se abre:

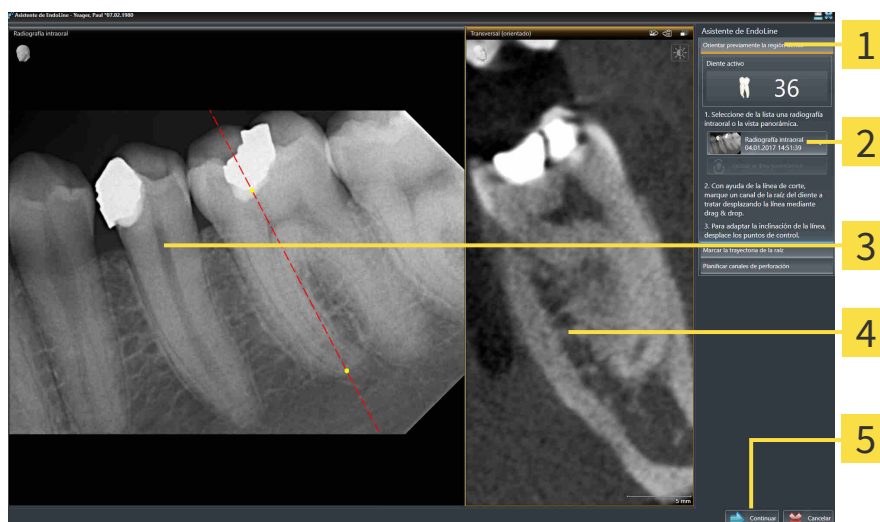

- | | |
|---|---|
| <p>1 Área Orientar previamente la región dental</p> <p>2 Lista con la vista Panorámica y radiografías intraorales</p> <p>3 PanorámicaVista o vista Radiografía intraoral</p> | <p>4 Vista Transversal (orientado)</p> <p>5 Botón Continuar</p> |
|---|---|

2. Seleccione de la lista una radiografía intraoral o la vista panorámica en el área **Orientar previamente la región dental**.

► SICAT Endo Muestra una línea de corte con dos puntos de control amarillos en la vista de la **radiografía intraoral** o en la vista **panorámica**.



3. Para desplazar la línea de corte, posicione el puntero del ratón en la línea de corte.
 - El puntero del ratón se transforma.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace la línea de corte a la posición deseada.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón.

- ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la línea de corte.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal (orientado)** a la posición cambiada de la línea de corte.
7. Para girar la línea de corte, posicione el puntero del ratón en uno de los dos puntos de control amarillos.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
 8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 9. Gire la línea de corte en la dirección deseada.
 10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual de la línea de corte.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal (orientado)** a la posición cambiada de la línea de corte.
 11. Haga clic en **Continuar**.
 - ▶ SICAT Endo lleva a cabo el ajuste de las vistas.
 - ▶ Se abre el paso **Colocar EndoLines**.

Continúe con *Colocar EndoLines* [▶ *Página 142 - SIDEXIS 4*].



Para que pueda elegir para la orientación previa entre una radiografía intraoral y la vista **Panorámica**, debe haber registrado al menos una radiografía intraoral para el diente seleccionado.



Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 100 - SIDEXIS 4*].

28.4 COLOCAR ENDOLINES

PRECAUCIÓN

El uso de la vista 3D para visualizar mediciones y objetos de planificación podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice la vista 3D únicamente de orientación y como fuente de información adicional.


Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 131 - SIDEXIS 4*].

En el paso **Colocar EndoLines** puede marcar los canales de las raíces que desee tratar en las vistas orientadas con ayuda de los EndoLines.

SICAT Endo identifica el punto inicial y el punto final al añadir un EndoLine y marca el punto inicial con un triángulo y el punto final con un círculo.

El orden de los puntos depende del número de diente anteriormente seleccionado y la posición del diente en el maxilar del paciente. En el maxilar superior, el punto inicial se encuentra por debajo del punto final; en el maxilar inferior, el punto inicial se encuentra por encima del punto final.

- Ha finalizado el paso **Orientar previamente la región dental**. Encontrará información sobre ello en *Orientar previamente la región dental* [► *Página 140 - SIDEXIS 4*].
- El paso **Colocar EndoLines** ya está abierto.

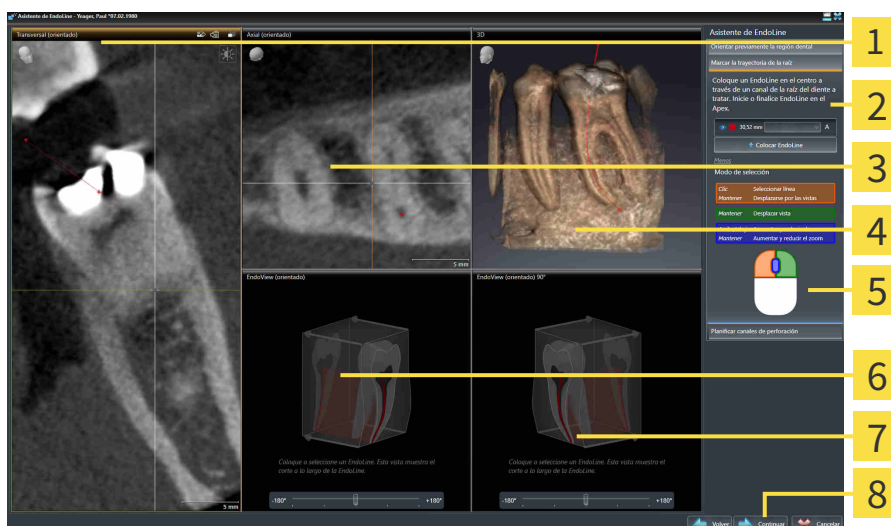

1 Vista **Transversal (orientado)**

2 Área **Colocar EndoLines**

3 Vista **Axial (orientado)**

4 **3D**Vista

5 Infografía

6 **EndoView (orientado)**

7 **EndoView (orientado) 90°**

8 Botón **Continuar**



1. Haga clic en el botón **Colocar EndoLine** del área **Colocar EndoLines**.
 - SICAT Endo destaca la vista **Transversal (orientado)** y la vista **Axial (orientado)**.
 - El puntero del ratón se transforma.
2. Sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal (orientado)** o en la vista **Axial (orientado)**.

3. Haga clic en el Apex o en el punto inicial con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo establece un punto de control.
4. Añada más puntos de control para marcar la trayectoria de la raíz haciendo clic en más puntos a lo largo de la trayectoria del canal de la raíz con el botón izquierdo del ratón.
5. Para finalizar el marcado del canal de la raíz, haga doble clic en el Apex o en el punto inicial.
 - ▶ SICAT Endo establece un punto de control.
 - ▶ SICAT Endo muestra todos los puntos de control así como una conexión entre los puntos en forma de EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo orienta la vista **EndoView (orientado)** y la vista **EndoView (orientado) 90°** al EndoLine.
6. En caso necesario, repita los pasos para marcar más canales de la raíz.
7. Compruebe los EndoLines colocados en la vista **EndoView (orientado)** o en la vista **EndoView (orientado) 90°**.
8. Haga clic en **Continuar**.

▶ El paso **Planificar canales de perforación** se abre.

Continúe con *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 151 - SIDEXIS 4*].

Puede editar el color y el texto para la descripción y la posición de un EndoLine. Encontrará información sobre ello en *Ajustar color y texto* [▶ *Página 144 - SIDEXIS 4*].

Puede editar un EndoLine desplazando, añadiendo o borrando puntos de control. Encontrará información sobre ello en *Añadir, desplazar y borrar puntos de control* [▶ *Página 145 - SIDEXIS 4*].

Puede utilizar un modo de rotación en la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Girar la vista 3D* [▶ *Página 148 - SIDEXIS 4*].

Puede visualizar impresiones ópticas importadas y registradas en la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Mostrar impresiones ópticas en la vista 3D* [▶ *Página 149 - SIDEXIS 4*].

Puede utilizar diferentes funciones para añadir un EndoLine con ayuda de los botones del ratón. Encontrará información sobre ello en *Utilizar botón del ratón* [▶ *Página 150 - SIDEXIS 4*].



Para seleccionar un EndoLine, puede hacer clic en la línea con el botón izquierdo del ratón en una de las vistas alineadas o seleccionar en el área **Colocar EndoLines**.



Para borrar un EndoLine, marque el EndoLine en el área **Colocar EndoLines** y haga clic en el botón **Borrar EndoLine** al final de la línea del EndoLine seleccionado.



Para adaptar la representación en el **EndoView (orientado)** o en el **EndoView (orientado) 90°**, puede utilizar la corredera en estas vistas. Con ayuda de la corredera, puede girar las vistas a la izquierda o a la derecha en el ángulo que desee.

28.5 AJUSTAR COLOR Y TEXTO

AJUSTAR COLOR

Para modificar el color de un EndoLine, haga lo siguiente:

1. En la línea del EndoLine, haga clic en el botón **Cambiar de color**.
 - ▶ SICAT Endo cambia el color del EndoLine.
2. Si el color no es el deseado, vuelva a hacer clic en el botón **Cambiar de color** hasta que SICAT Endo muestre el color deseado.
 - ▶ SICAT Endo muestra el nuevo color del EndoLine.

AJUSTAR TEXTO PARA LA DESCRIPCIÓN O LA INDICACIÓN DE LA POSICIÓN

Para modificar el texto para la descripción o para la indicación de la posición del EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Para introducir una descripción para el EndoLine, haga clic en el campo **Descripción/posición** en la línea del EndoLine.
 - ▶ El puntero del ratón parpadea en la posición de entrada.
2. Indique la descripción deseada para el EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo muestra la descripción .
3. Para seleccionar un texto para la indicación de la posición del EndoLine, haga clic en el símbolo de la flecha en el campo **Descripción/posición** en la línea del EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo muestra una lista con indicaciones de posiciones.
4. Haga clic en la indicación de la posición deseada en la lista.
 - ▶ SICAT Endo muestra la indicación de la posición en el campo **Descripción/posición**.
5. Para aceptar los cambios y cerrar el campo **Descripción/posición**, haga clic con el botón izquierdo del ratón en un punto fuera del campo **Descripción/posición**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva descripción o indicación de la posición.




28.6 AÑADIR, DESPLAZAR Y BORRAR PUNTOS DE CONTROL

AÑADIR PUNTOS DE CONTROL A UN ENDOLINE

Para añadir un punto de control a un EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Posicione el puntero del ratón en el punto del EndoLine en el que desee añadir un punto de control.

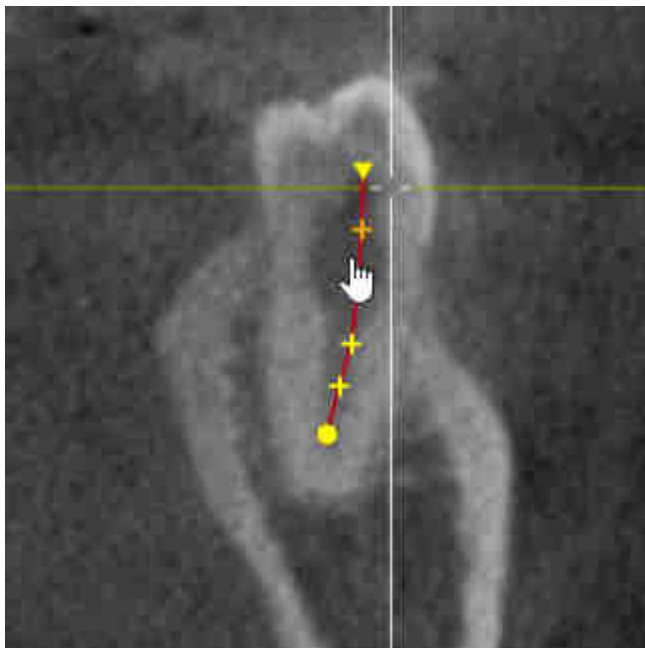


- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Haga doble clic en el punto.
- ▶ SICAT Endo añade un punto de control en forma de cruz.

DESPLAZAR PUNTOS DE CONTROL DE UN ENDOLINE

Para desplazar puntos de control de un EndoLine, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón en el punto de control del EndoLine que desee desplazar.

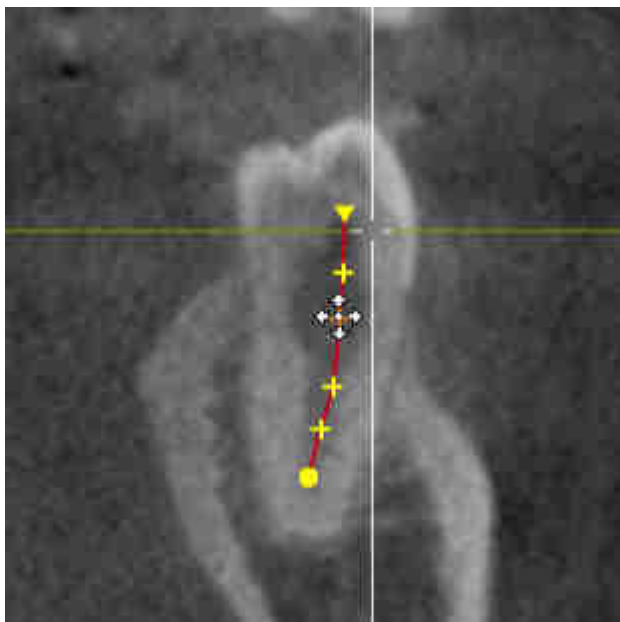


- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ El punto de control sigue el movimiento del ratón.
 - ▶ SICAT Endo adapta el EndoLine de acuerdo a la nueva posición del punto de control.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del punto de control.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva trayectoria del EndoLine.

BORRAR PUNTOS DE CONTROL DE UN ENDOLINE

Para borrar un punto de control de un EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Sitúe el puntero del ratón en el punto de control del EndoLine que desee borrar.

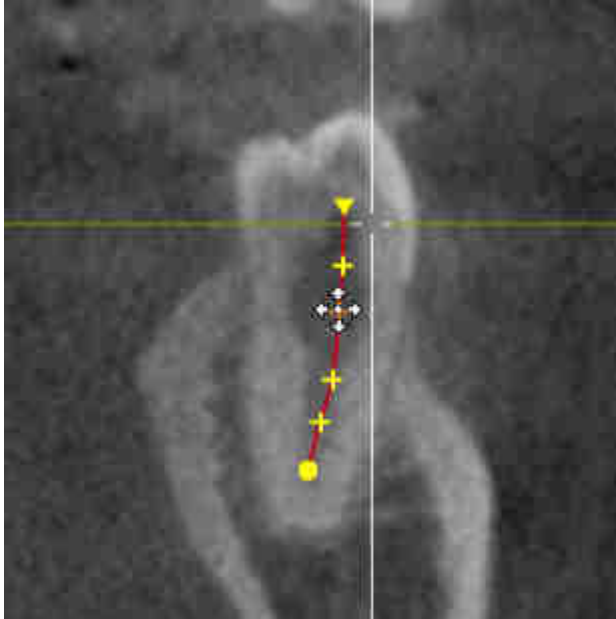

- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Haga clic en el punto de control con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo marca el punto de control.
 3. Pulse la tecla **Supr**.
 - ▶ SICAT Endo borra el punto de control.
 - ▶ SICAT Endo ajusta en correspondencia el punto de control.



Recuerde que el EndoLine se borrará por completo tan pronto como borre el penúltimo punto de control.

28.7 GIRAR LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 86 - SIDEXIS 4*].

Con la función **Girar la vista 3D** puede conectar y desconectar un modo de rotación para la radiografía 3D en el asistente de EndoLine. Si está conectado el modo de rotación, SICAT Endo gira la radiografía 3D en el sentido de las agujas del reloj.

Para utilizar el modo de rotación, haga lo siguiente:

Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [▶ *Página 72 - SIDEXIS 4*].

1. Ajuste la representación de la radiografía 3D de tal manera que se muestre la sección de la imagen deseada.
2. Asegúrese de haber seleccionado el tipo de representación deseado. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 88 - SIDEXIS 4*].
3. Asegúrese de seleccionar el modo de sección deseado. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [▶ *Página 91 - SIDEXIS 4*].



4. Haga clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - ▶ SICAT Endo gira la radiografía 3D en torno al eje vertical de la sección seleccionada.
5. Para finalizar el modo de rotación, vuelva a hacer clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - ▶ SICAT Endo finaliza el giro de la radiografía 3D.



Para finalizar el modo de rotación, también puede hacer clic en el punto que desee dentro de la vista **3D**.

28.8 MOSTRAR IMPRESIONES ÓPTICAS EN LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 86 - SIDEXIS 4*].

Si ya ha importado y registrado impresiones ópticas, puede mostrar y ocultar las impresiones ópticas en el asistente de EndoLine en la vista **3D**.

Para mostrar u ocultar las impresiones ópticas, proceda de la siguiente manera:

- ✓ Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [▶ *Página 72 - SIDEXIS 4*].
- ✓ Ya ha importado y registrado al menos una impresión óptica. Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 104 - SIDEXIS 4*].



1. Para mostrar las impresiones ópticas, haga clic en el botón **Mostrar objeto**.

- ▶ SICAT Endo muestra las impresiones ópticas.
- ▶ SICAT Endo actualiza la representación de la radiografía 3D.



2. Para ocultar las impresiones ópticas, haga clic en el botón **Ocultar objeto**.


- ▶ SICAT Endo oculta las impresiones ópticas.
- ▶ SICAT Endo actualiza la representación de la radiografía 3D.



Si aún no ha importado y registrado ninguna impresión óptica, SICAT Endo no muestra el botón **Mostrar objeto** en la vista **3D**.

28.9 UTILIZAR BOTÓN DEL RATÓN

SICAT Endo muestra un gráfico que explica cómo deben utilizarse los botones del ratón a la hora de establecer un EndoLine:

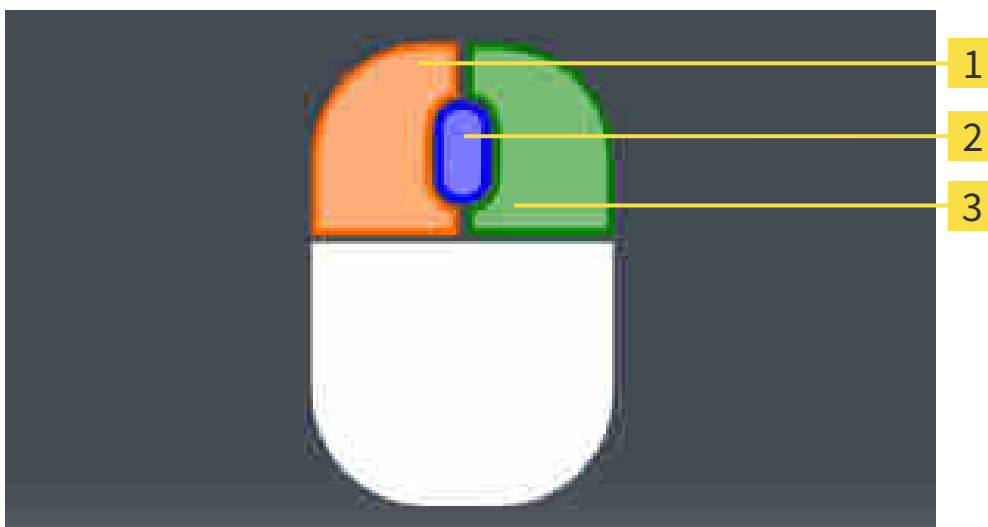

1 Botón izquierdo del ratón

3 Botón derecho del ratón

2 Rueda del ratón

Si activa un botón del ratón, SICAT Endo lo destaca en el gráfico. La acción enlazada a un botón del ratón depende del modo de edición.

SICAT Endo diferencia entre los siguientes modos de edición:

- Crear
- Editar
- Seleccionar

Dependiendo del modo de edición, tendrá disponibles diferentes acciones. Las acciones disponibles se muestran por encima del gráfico en forma de tabla y aparecen siempre con el color del botón del ratón correspondiente.

Puede ocultar y mostrar el gráfico según lo que necesite.

28.10 PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN



PRECAUCIÓN

Una profundidad de perforación incorrecta puede conllevar un tratamiento incorrecto.

Asegúrese de que la profundidad de perforación y el taladro seleccionado coincidan.


Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 131 - SIDEXIS 4*].

En el paso **Planificar canales de perforación** puede añadir o editar canales de perforación ortógrados y retrógrados a los EndoLines. Puede añadir un canal de perforación ortógrado y un canal de perforación retrógrado por cada EndoLine. Un canal de perforación tiene siempre el mismo color que el EndoLine que pertenece al canal de perforación

ABRIR EL PASO «PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN»

- ☑ Ha finalizado el paso **Colocar EndoLines**. Encontrará información sobre ello en *Colocar EndoLines* [► *Página 142 - SIDEXIS 4*].
- ☑ El paso **Colocar EndoLines** está abierto.
 - En el paso **Colocar EndoLines**, haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Planificar canales de perforación** se abre:

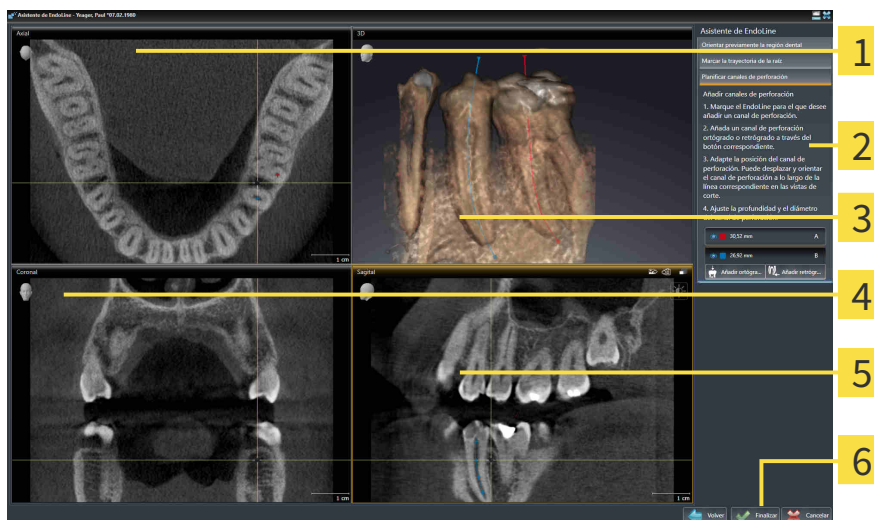

1 AxialVista

2 Área **Añadir canales de perforación**

3 3DVista

4 CoronalVista

5 SagitalVista


6 Botón **Finalizar**

PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN ORTÓGRADOS

1. En el área **Añadir canales de perforación**, seleccione el EndoLine al que desee añadir un canal de perforación ortógrado.
 - ▶ SICAT Endo marca el EndoLine



2. Haga clic en el botón **Añadir ortógrado**.
 - ▶ SICAT Endo añade un canal de perforación ortógrado al EndoLine marcado.
 - ▶ SICAT Endo adapta las vistas de la siguiente manera:

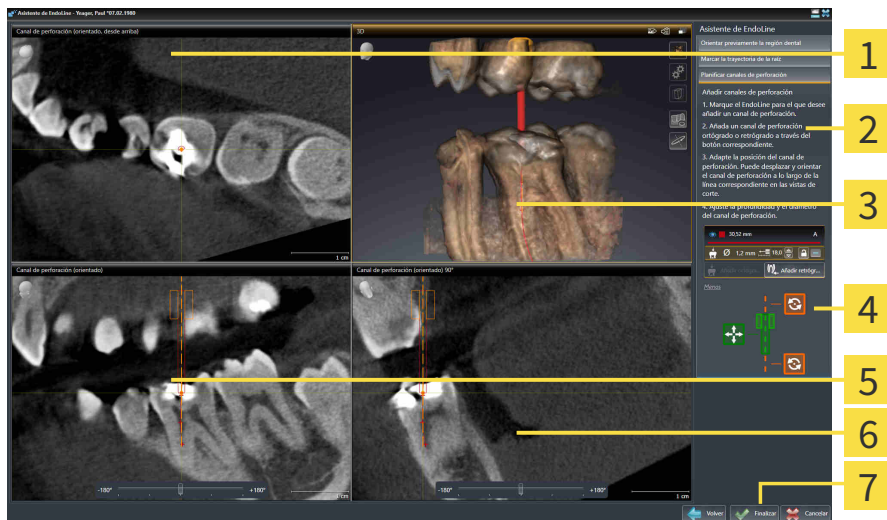

1 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

5 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 Área **Añadir canales de perforación**

6 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

3 **3D**Vista

7 Botón **Finalizar**

4 Infografía




3. Para adaptar la posición del canal de perforación a lo largo del EndoLine, sitúe el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** sobre el canal de perforación.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el canal de perforación a la posición deseada.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



7. Para adaptar el giro del canal de perforación, posicione el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** fuera del canal de perforación en el EndoLine.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.

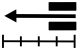8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
9. Gire el EndoLine con el canal de perforación en la dirección deseada.
10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual del EndoLine y del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.
-  11. En caso necesario, puede adaptar la posición del casquillo de perforación haciendo clic en las teclas de flechas detrás del campo **Profundidad [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva profundidad del casquillo de perforación.
12. Para finalizar la planificación de los canales de perforación, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente de EndoLine.
 - ▶ Se abre el área de trabajo **Radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra los canales de perforación planificados.

PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN RETRÓGRADOS

1. En el área **Añadir canales de perforación**, seleccione el EndoLine al que desee añadir un canal de perforación retrógrado.


► SICAT Endo marca el EndoLine



2. Haga clic en el botón **Añadir retrógrado**.

► SICAT Endo añade un canal de perforación retrógrado al EndoLine marcado.

► SICAT Endo adapta las vistas de la siguiente manera:

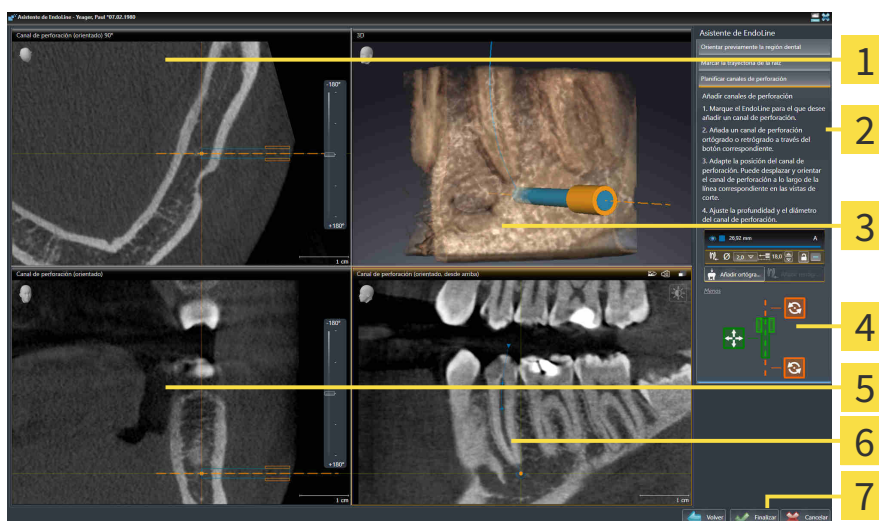

1 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°** **5** Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 Área **Añadir canales de perforación**

6 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

3 **3D**Vista

7 Botón **Finalizar**

4 Infografía



3. Para adaptar la posición del canal de perforación a lo largo del EndoLine, sitúe el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** sobre el canal de perforación.

► El puntero del ratón se transforma.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

5. Desplace el canal de perforación a la posición deseada.

6. Suelte el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Endo mantiene la posición actual del canal de perforación.

► SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



7. Para adaptar el giro del canal de perforación, posicione el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** fuera del canal de perforación en el EndoLine.

► El puntero del ratón se transforma.

8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
9. Gire el EndoLine con el canal de perforación en la dirección deseada.
10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual del EndoLine y del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



11. En caso necesario, puede adaptar la posición del casquillo de perforación haciendo clic en las teclas de flechas detrás del campo **Profundidad [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva profundidad del casquillo de perforación.



12. En caso necesario, puede adaptar el diámetro del canal de perforación retrógrado haciendo clic en el símbolo de la flecha detrás del campo **Diámetro [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra una lista de diámetros disponibles.

13. Haga clic en el diámetro deseado.
 - ▶ SICAT Endo muestra el nuevo diámetro del canal de perforación.

14. Para finalizar la planificación de los canales de perforación, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente de EndoLine.
 - ▶ Se abre el área de trabajo **Radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra los canales de perforación planificados.

BLOQUEAR CANALES DE PERFORACIÓN

Utilice esta función para proteger los canales de perforación de los cambios.

Para bloquear un canal de perforación, haga lo siguiente:

- El canal de perforación ya está marcado.



- Haga clic en el símbolo **Bloquear objeto**.
 - ▶ SICAT Endo bloquea el canal de perforación para su edición.
 - ▶ SICAT Endo bloquea el EndoLine correspondiente.

DESBLOQUEAR CANALES DE PERFORACIÓN

Para desbloquear un canal de perforación, haga lo siguiente:

- El canal de perforación está bloqueado.
- El canal de perforación ya está activado.



- Haga clic en el símbolo **Desbloquear objeto**.
 - ▶ SICAT Endo desbloquea el canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo desbloquea el EndoLine correspondiente.

ELIMINAR CANALES DE PERFORACIÓN

Para eliminar un canal de perforación, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el área **Añadir canales de perforación** en el objeto planificado Endo que contenga el canal de perforación que desee borrar.
 - ▶ SICAT Endo marca el objeto planificado Endo.
2. Haga clic en el objeto planificado Endo en el canal de perforación que desee borrar.
 - ▶ SICAT Endo marca el canal de perforación.
3. Al final de la línea, haga clic en el botón **Eliminar canal de perforación**.
 - ▶ SICAT Endo elimina el canal de perforación.



Si ha bloqueado un canal de perforación para su edición, tampoco podrá editar el EndoLine correspondiente. Para poder editar el EndoLine, deberá desbloquear el canal de perforación correspondiente.

29 MEDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁNGULOS

Existen dos tipos de mediciones diferentes en SICAT Endo:



- Mediciones de distancias




- Mediciones de ángulos

Las herramientas para añadir mediciones se encuentran en el paso **Diagnosticar** de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Puede añadir mediciones en todas las vistas de corte 2D. Cada vez que añada una medición, SICAT Endo la añade también al grupo **Mediciones** en el **Navegador de objetos**.

Para las mediciones están disponibles las siguientes acciones:

- *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 158 - SIDEXIS 4*]
- *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 159 - SIDEXIS 4*]
- *Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas* [▶ *Página 161 - SIDEXIS 4*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: encontrará información sobre ello en Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*].
- *Enfocar mediciones, eliminar mediciones y deshacer y rehacer acciones de medición: encontrará más información al respecto en Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].

29.1 AÑADIR MEDICIONES DE DISTANCIAS

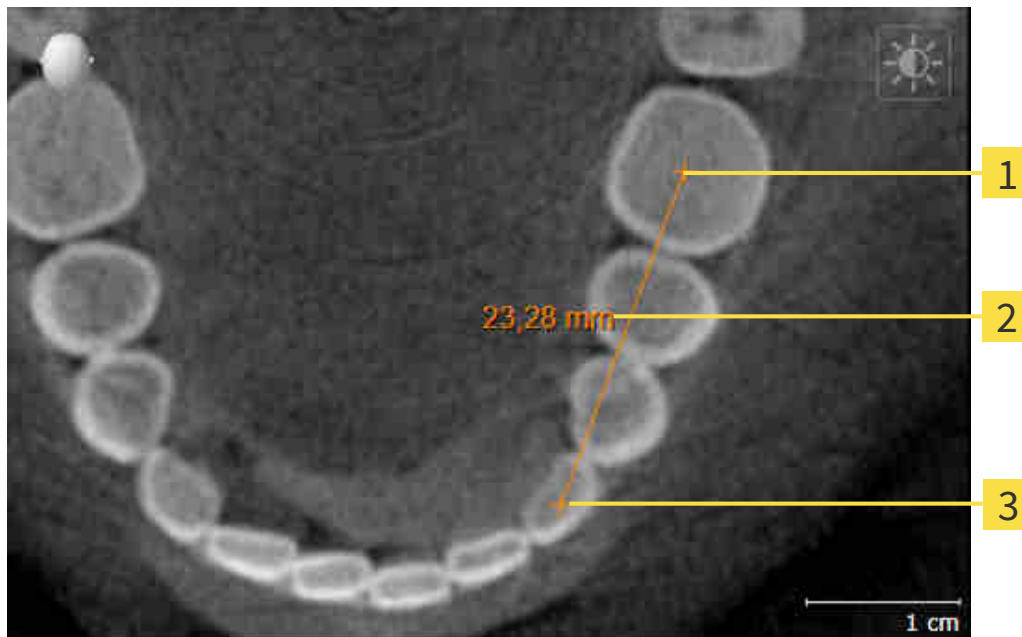

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

Para añadir una medición de distancia, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.




1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de distancias (D)**.
 - ▶ SICAT Endo añade una nueva medición de distancia al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de distancias.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra una línea de distancia entre el punto de inicio y el puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra la distancia actual entre el punto de inicio y el puntero del ratón en el centro de la línea de distancia y en el **Navegador de objetos**.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final de la medición de distancias y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

29.2 AÑADIR MEDICIONES DE ÁNGULOS

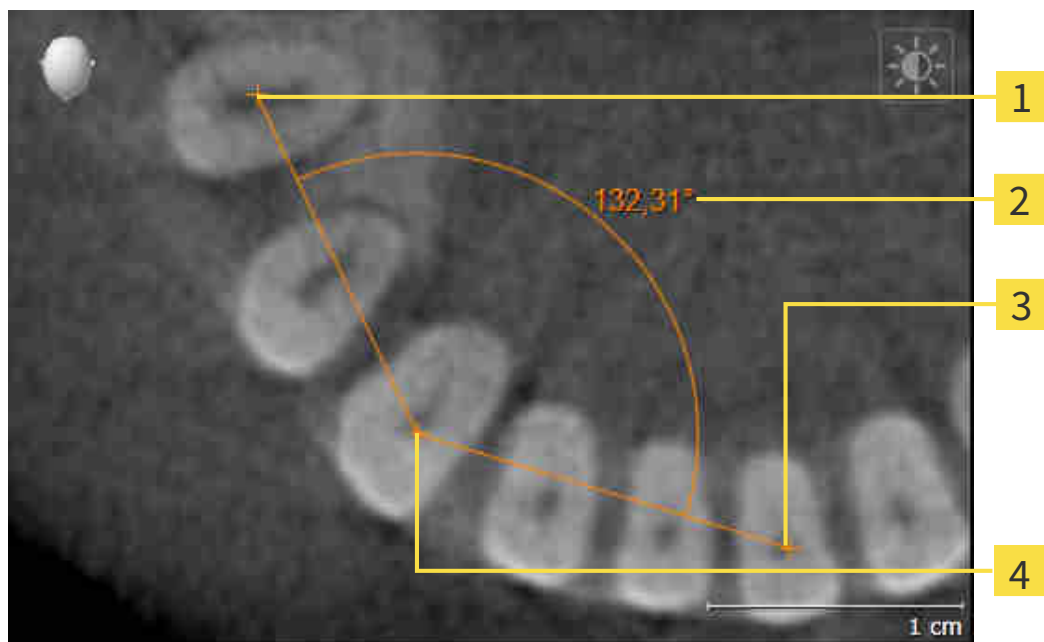

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

4 Punto más alto

Para añadir una medición de ángulo, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.



1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de ángulo (A)**.
 - ▶ SICAT Endo añade una nueva medición de ángulo al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de ángulos.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra el primer lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el punto de inicio hasta el puntero del ratón.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto más alto de la medición de ángulos y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo indica el vértice mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra el segundo lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el vértice hasta el puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el ángulo actual entre los dos lados de la medición y en el **Navegador de objetos**.

5. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final del segundo lado y haga clic con el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Endo indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

29.3 DESPLAZAR MEDICIONES, PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES Y LECTURAS

DESPLAZAR MEDICIONES

Para desplazar una medición, haga lo siguiente:

SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre una línea de la medición.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la medición.
 - ▶ La medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la medición.

DESPLAZAR PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES

Para desplazar un punto de medición individual, haga lo siguiente:

SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el punto de medición que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada del punto de medición.
 - ▶ El punto de medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ La lectura cambia mientras desplaza el ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la lectura.

DESPLAZAR LECTURAS

Para desplazar una lectura, haga lo siguiente:

☑ SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 58 - SIDEXIS 4*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la lectura que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la lectura.
 - ▶ La lectura sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra una línea de puntos entre la lectura y la respectiva medición.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la lectura.



Tras haber desplazado el usuario el valor de una medición, SICAT Endo determina el valor de una posición absoluta. Para que el valor vuelva a ser relativo a la medición, haga doble clic en el valor.

30 INFORMAR AL PACIENTE



PRECAUCIÓN

Utilizar el impreso con fines de diagnóstico podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice exclusivamente las funciones de visualización de imágenes médicas de la interfaz de usuario del software para realizar un diagnóstico y planificar el tratamiento.

Con imágenes específicas de un paciente puede explicar a ese paciente su diagnóstico y aclarar el tratamiento. La explicación al paciente tiene lugar en dos pasos:

1. En su consulta en SICAT Endo
2. A través de una información del paciente mediante impreso.

El contenido de los impresos puede redactarse en pantalla durante las explicaciones.

Gracias al impreso, el paciente puede entender mejor los resultados y luego comentarlos con otras personas.

La creación de impresos consta de los siguientes pasos:

- *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 164 - SIDEXIS 4*]
- *Preparar impresos* [▶ *Página 167 - SIDEXIS 4*]
- *Generar impresos* [▶ *Página 169 - SIDEXIS 4*]

30.1 CREAR IMÁGENES Y CAPTURAS DE PANTALLA

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [▶ *Página 163 - SIDEXIS 4*].

Encontrará información general sobre la manera de administrar imágenes y capturas de pantalla en *Objetos de SICAT Endo* [▶ *Página 61 - SIDEXIS 4*].

Existen dos herramientas de dibujo:

- **Dibujar flecha**
- **Dibujar círculo**

DIBUJAR FLECHAS

Para dibujar una flecha, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha orientado el volumen de acuerdo con sus requisitos. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 95 - SIDEXIS 4*].
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar la punta de la flecha y mantenga el botón pulsado.
4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra una flecha en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el extremo de la flecha coincide con la posición del puntero del ratón.
5. Sitúe el puntero del ratón en la posición deseada para el extremo de la flecha y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra la flecha terminada en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
6. Haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
 - ▶ SICAT Endo sale del modo de dibujar flechas.

DIBUJAR CÍRCULOS

Para dibujar un círculo, haga lo siguiente:

- ✓ Ya ha alineado el volumen en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 95 - SIDEXIS 4*].
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar el centro del círculo y mantenga el botón pulsado.
4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra un círculo en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el radio del círculo coincide con la distancia entre el centro y la posición del puntero del ratón.
5. Mueva el puntero hasta alcanzar el radio deseado y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el círculo terminado en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
6. Haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
 - ▶ SICAT Endo sale del modo de dibujar círculos.



Mientras la herramienta de dibujo **Dibujar flecha** o la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** está activa, puede crear varios objetos de dibujo consecutivamente. Para cancelar el uso de una herramienta de dibujo, haga clic en un punto fuera de la vista en cuestión o pulse la tecla **ESC**.

AJUSTAR HERRAMIENTAS DE DIBUJO

La herramienta de dibujo **Dibujar flecha** y la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** pueden ajustarse por separado. Los cambios en los ajustes afectan solo a los objetos de dibujo creados posteriormente.


Para ajustar una herramienta de dibujo, haga lo siguiente:

- ✓ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Ajustar herramienta de dibujo** junto al símbolo **Dibujar flecha** o junto al símbolo **Dibujar círculo**, según corresponda.

- ▶ Se abre la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**:

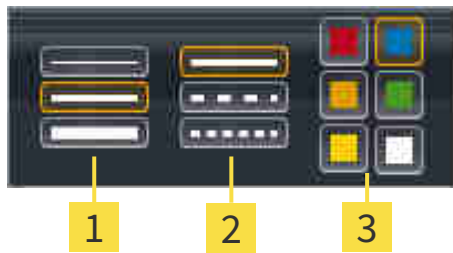

- 1** Símbolos para el **Grosor de línea**
- 2** Símbolos para el **Tipo de línea**
- 3** Símbolos para el **Color de línea**

2. Haga clic en los símbolos que desee para ajustar el **Grosor de línea**, el **Tipo de línea** y el **Color de línea** de la herramienta de dibujo.
3. Haga clic en un punto cualquiera fuera de la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.

- ▶ SICAT Endo cierra la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.
- ▶ SICAT Endo guarda los ajustes en su perfil de usuario.
- ▶ SICAT Endo aplica los nuevos ajustes a los objetos de dibujo creados desde ahora.

AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA A LA VENTANA "CREAR IMPRESO"

Puede crear capturas de pantalla de todas las vistas, en todas las áreas de trabajo y en todas las ventanas, siempre y cuando la vista incluya el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

Para añadir capturas de pantalla al impreso, haga lo siguiente:

1. Para hacer una captura de pantalla de una vista, haga clic en la **Barra de herramientas de la vista** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
 2. Para hacer una captura de pantalla de toda el área de trabajo, haga clic en la **Barra de herramientas del área de trabajo** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
- ▶ SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen de pantalla** en el **Navegador de objetos** y activa el objeto.
 - ▶ La captura de pantalla está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 - ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla en el portapapeles de Windows.

Continúe con *Preparar impresos* [▶ *Página 167 - SIDEXIS 4*].

30.2 PREPARAR IMPRESOS

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [► *Página 163 - SIDEXIS 4*].

Para preparar impresos, están disponibles las siguientes acciones:

- Abrir la ventana **Creación del informe**
- Modificar ajustes de impresos
- Preparar elementos

ABRIR LA VENTANA "CREACIÓN DEL INFORME"

- ☑ Ha creado al menos un objeto **Imagen** o un objeto **Imagen de pantalla**.
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



- Haga clic en el símbolo **Crear impreso de información al paciente**.

► Se abre la ventana **Creación del informe**:

MODIFICAR AJUSTES DE IMPRESOS

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.
1. Haga clic en el símbolo para la disposición deseada de las imágenes en el área **Ajustes de la galería de imágenes**:
 - SICAT Endo muestra las imágenes de acuerdo con el ajuste deseado.
 2. En el área **Ajustes globales**, haga clic en el botón con el tamaño del papel que desee.
 - SICAT Endo modifica el tamaño del papel de acuerdo con el ajuste deseado.
 3. Active o desactive la casilla de comprobación **Anonimizar información del paciente**.
 - SICAT Endo muestra en el impreso la información real del paciente o la información anonimizada del paciente de acuerdo con el ajuste seleccionado.

PREPARAR ELEMENTOS PARA IMPRESOS

La ventana **Creación del informe** muestra capturas de pantalla de objetos **Imagen** y capturas de pantalla de objetos **Imagen de pantalla**. Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [► *Página 164 - SIDEXIS 4*].

Si desea preparar elementos para impresos, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.



1. Si desea ocultar un elemento en el impreso, desactive la casilla de comprobación del elemento.
 - SICAT Endo oculta el elemento en el impreso.



2. Si desea que SICAT Endo muestre una sola imagen en una página, haga clic en el símbolo **Mostrar imagen en una sola página**.



3. Si desea añadir una descripción a un elemento, haga clic en el símbolo **Editar la descripción de imagen** del elemento.
 - ▶ SICAT Endo muestra una versión ampliada del elemento y un campo de texto:
4. Introduzca un texto en el campo de texto.
 - ▶ Si el texto introducido es parte de un módulo de texto existente, SICAT Endo muestra la lista de módulos de texto.
5. Haga clic en el módulo de texto deseado.
 - ▶ SICAT Endo añade el módulo de texto en el campo de texto.
6. Si el texto deseado no existe como módulo de texto, introduzca un texto nuevo.
7. Haga clic en el botón **OK**.
 - ▶ SICAT Endo guarda el texto como descripción de la captura de pantalla.
 - ▶ Si el texto introducido no existe como módulo de texto, SICAT Endo guarda la descripción como nuevo módulo de texto en su perfil de usuario.
8. Si desea modificar el orden de los elementos en el impreso, hágalo mediante arrastrar y soltar.



Al situar el puntero del ratón sobre un módulo de texto, SICAT Endo muestra el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**. Si hace clic en el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**, SICAT Endo elimina el módulo de texto de su perfil de usuario.



En la ventana que muestra las versiones ampliadas de los elementos puede cambiar entre los elementos haciendo clic en el botón **Siguiente elemento** y el botón **Elemento anterior**.

Puede eliminar por completo elementos del impreso por medio del **Navegador de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 60 - SIDEXIS 4*].

Continúe con *Generar impresos* [▶ *Página 169 - SIDEXIS 4*].



SICAT Endo utiliza el logotipo de la consulta y el texto informativo de la consulta que se hayan configurado en los ajustes generales. Encontrará más información al respecto en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 191 - SIDEXIS 4*].

30.3 GENERAR IMPRESOS

Para producir un impreso, están disponibles las siguientes acciones:

- Guardar impreso como archivo PDF
- Imprimir impreso

GUARDAR IMPRESO COMO ARCHIVO PDF

La ventana **Creación del informe** ya está abierta:



1. En el área **Edición**, haga clic en el botón **Exportación de PDF**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
2. Vaya hasta el directorio donde quiera guardar el impreso.
3. Escriba un nombre en el campo **Nombre del archivo** y haga clic en **Guardar**.
 - ▶ La ventana del explorador de archivos de Windows se cierra.
 - ▶ SICAT Endo guarda el impreso como archivo PDF.

IMPRIMIR IMPRESO



Para que los impresos tengan una calidad adecuada, se necesita una impresora que cumpla determinados requisitos. Encontrará más información al respecto en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 10 - SIDEXIS 4*].



La ventana **Creación del informe** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Imprimir**.
 - ▶ Se abre la ventana **Drucken**.
2. Seleccione la impresora que desee y modifique los ajustes de la impresora si es necesario.
3. Haga clic en **Drucken**.
 - ▶ SICAT Endo envía el impreso a la impresora.

31 EXPORTACIÓN DE DATOS

Puede exportar datos.

Cuando SICAT Suite funciona como módulo SIDEXIS 4, para la exportación de datos deben utilizarse las funciones correspondientes de SIDEXIS 4. Encontrará más información al respecto en las Instrucciones de utilización de SIDEXIS 4.

32 PROCESO DE PEDIDO


Para encargar el producto deseado, haga lo siguiente:


- En SICAT Endo, coloque los datos de planificación deseados para plantillas de perforación en la cesta de la compra. Encontrará información sobre ello en *Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra* [▶ *Página 172 - SIDEXIS 4*].
- Compruebe la cesta de la compra e inicie el pedido. Encontrará información sobre ello en *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 177 - SIDEXIS 4*].
- Termine el pedido directamente en el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite o en otro PC con una conexión activa a Internet. Encontrará información al respecto en *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 178 - SIDEXIS 4*] o en *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 182 - SIDEXIS 4*].



Puede añadir a la cesta de la compra pedidos que pertenezcan a la misma radiografía 3D.

32.1 COLOCAR PLANTILLAS DE PERFORACIÓN EN LA CESTA DE LA COMPRA

 **PRECAUCIÓN** **El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.**
 Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.

 **PRECAUCIÓN** **Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.**

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

Encontrará información general sobre el proceso de pedido en *Proceso de pedido* [► *Página 171 - SIDEXIS 4*].


En SICAT Endo se coloca en el primer paso del proceso de pedido una **SICAT GUIDE (ENDO)** plantilla de perforación en la cesta de la compra. Para poder colocar una **SICAT GUIDE (ENDO)** en la cesta de la compra, debe cumplir determinados requisitos. Si no cumple todos los requisitos, SICAT Endo lo notifica.

SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 55 - SIDEXIS 4*].



1. Haga clic en el símbolo **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)**.
 ► Se abre la ventana **Pedido incompleto**:

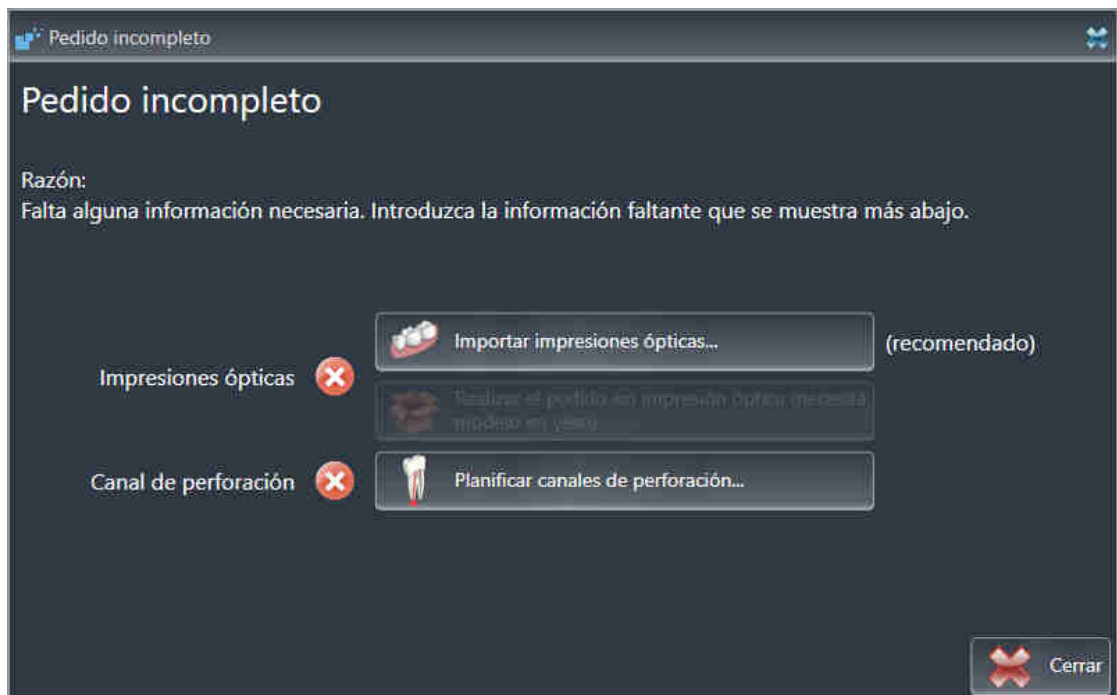

2. Si todavía no ha registrado ninguna impresión óptica, haga clic en el botón **Importar impresiones ópticas** e importe una impresión óptica que sea adecuada para la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Impresiones ópticas* [► *Página 103 - SIDEXIS 4*].

3. Si todavía no ha planificado ningún canal de perforación, haga clic en el botón **Planificando canales de perforación** y coloque como mínimo un canal de perforación. Encontrará información sobre ello en *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 151 - SIDEXIS 4*].



Es posible que tenga que adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica antes de importar las impresiones ópticas. Puede activar la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** directamente desde la ventana **Importar y registrar impresiones ópticas** en el paso **Registrar** haciendo clic en el botón **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 100 - SIDEXIS 4*].



Si en lugar de impresiones ópticas quiere enviar impresiones de yeso a SICAT, también puede colocar plantillas de perforación sin impresiones ópticas en la cesta de la compra haciendo clic en el botón **Realizar el pedido sin impresión óptica (necesita modelo en yeso)** de la ventana **Pedido incompleto**. A continuación, el paso **Pedir plantilla de perforación** muestra la información **Este pedido no contiene ninguna impresión óptica. Envíe los modelos de yeso correspondientes a SICAT**.

SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS


- Ya ha importado al menos una impresión óptica.
- Ya ha colocado EndoLines.
- Ya ha colocado canales de perforación.
- El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 55 - SIDEXIS 4*].



- Haga clic en el símbolo **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)**.
- ▶ Se abre la ventana **Pedir plantilla de perforación**.

COMPRUEBE SU PEDIDO EN LA VENTANA PEDIR PLANTILLA DE PERFORACIÓN

☑ La ventana **Pedir plantilla de perforación** ya está abierta:

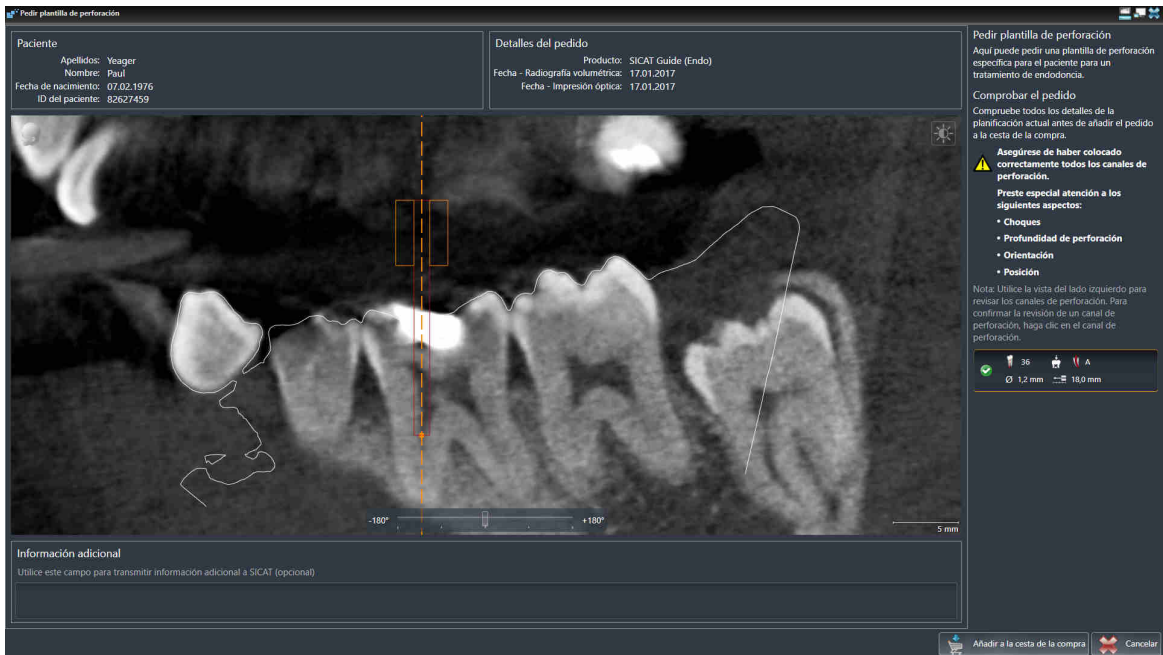

1. En el área **Paciente** y en el área **Detalles del pedido**, compruebe si la información del paciente y la información de la radiografía son correctas.
2. Revise si ha colocado correctamente todos los canales de perforación.
3. Para confirmar la comprobación de un canal de perforación, marque el objeto planificado Endo correspondiente en el área **Comprobar el pedido**.
 - ▶ SICAT Endo marca el objeto planificado Endo.
4. Ponga una marca de verificación.
 - ▶ SICAT Endo muestra una marca de verificación verde.
5. Repita los pasos para todos los canales de perforación que contenga su pedido.
6. Si lo desea, introduzca información adicional para SICAT en el campo **Información adicional**.
7. Haga clic en el botón **Añadir a la cesta**.



- ▶ SICAT Endo coloca los datos de planificación deseados para **SICAT GUIDE (ENDO)** en la cesta de la compra de SICAT Suite.
- ▶ La ventana **Pedir plantilla de perforación** se cierra.
- ▶ SICAT Endo abre la cesta de la compra de SICAT Suite.



Puede añadir un pedido a la cesta de la compra únicamente si ha revisado todos los canales de perforación planificados y ha confirmado la revisión para cada canal de perforación.



En caso de haber detectado un error durante la comprobación de los canales de perforación, pero si ya ha confirmado la comprobación poniendo al menos una marca de verificación, haga clic en el botón **Cancelar** y, a continuación, realice de nuevo los pasos para la comprobación de su pedido.



Siempre que haya un pedido en la cesta de la compra, ya no podrá sobrescribir impresiones ópticas, EndoLines ni canales de perforación. No podrá volver a hacerlo hasta que finalice o elimine el pedido. Si sobrescribe o elimina las impresiones ópticas, EndoLines o canales de perforación de una planificación, no podrá volver a encargar la misma plantilla de perforación.



Puede cancelar el pedido haciendo clic en **Cancelar**.

Continúe con *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 177 - SIDEXIS 4*].


32.2 ABRIR LA CESTA DE LA COMPRA

- ☑ La cesta de la compra contiene al menos un producto.
- ☑ Ha activado la visualización de la cesta de la compra en la fase **Edición**. Encontrará más información al respecto en las Instrucciones de utilización de SIDEXIS 4.



- Si la cesta de la compra no está abierta ya, haga clic en el botón **Cesta de la compra** de la **Barra de exploración**.
- ▶ Se abre la ventana **Cesta de la compra**.

También puede hacer clic en el botón **Cesta de la compra** en la fase **Edición**:

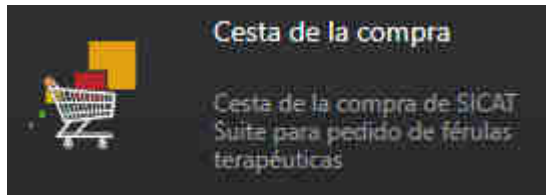

Continúe con la siguiente acción:

- *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ [Página 177 - SIDEXIS 4](#)]

32.3 COMPROBAR LA CESTA DE LA COMPRA Y FINALIZAR EL PEDIDO

☑ La ventana **Cesta de la compra** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la cesta de la compra* [▶ *Página 176 - SIDEXIS 4*].

1. En la ventana **Cesta de la compra**, compruebe si están incluidos los productos deseados.

2. Haga clic en el botón **Finalizar el pedido**.

▶ SICAT Suite fija el estado de los pedidos en **En preparación** y establece una conexión con el servidor SICAT a través de SICAT WebConnector.

▶ Si dispone de una conexión activa a Internet, las modificaciones en el pedido solo podrán efectuarse en el portal SICAT.

Continúe con una de las siguientes acciones:

■ *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 178 - SIDEXIS 4*]

■ *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 182 - SIDEXIS 4*]

32.4 FINALIZAR EL PEDIDO CON AYUDA DE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET



En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.

- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
 - ☑ El portal SICAT se ha abierto automáticamente en su navegador.
1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra los productos contenidos y los precios respectivos agrupados por paciente.
 2. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 179 - SIDEXIS 4*].
 - ▶ SICAT Suite prepara los datos de pedido para la carga.
 - ▶ Tan pronto como se terminan los preparativos, SICAT WebConnector transfiere los datos de pedido al servidor SICAT a través de una conexión encriptada.
 - ▶ En la cesta de la compra, el estado del pedido pasa a **Cargando**.

Además, en la cronología de SIDEXIS 4 cambia el símbolo del estudio de tal manera que la entrada **Treat** se destaca.



SICAT Suite muestra el pedido hasta que se ha terminado de cargar. Esto se aplica también a los pedidos que se cargan en otro PC, si es que varios PC utilizan el servidor SIDEXIS actual. En la cesta de la compra puede pausar, reanudar y cancelar la carga de los pedidos que se han iniciado en el PC actual.



Si cierra la sesión de Windows durante la carga, SICAT WebConnector detiene el proceso. El software reanuda automáticamente la carga tras iniciar sesión otra vez.

32.5 REALIZAR LOS PASOS DE PEDIDO EN EL PORTAL SICAT

Después de realizar los pasos de pedido en SICAT Suite, se abre el portal SICAT en su navegador web estándar. En el portal SICAT puede modificar sus pedidos, seleccionar proveedores cualificados para la fabricación y ver los precios de los productos.

Para realizar los pasos de pedido en el portal SICAT, haga lo siguiente:

1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
2. Compruebe si están incluidos los productos deseados.
3. Si es necesario, elimine pacientes y, con ello, también todos los respectivos productos de la vista general de pedidos. Al finalizar el pedido, SICAT Suite adopta las modificaciones que se han realizado en el portal SICAT.
4. Compruebe si la dirección de facturación y la dirección de suministro son correctas. Modifíquela si es necesario.
5. Elija la forma de envío deseada.
6. Acepte las condiciones comerciales generales y envíe el pedido.



Puede eliminar pacientes y todas las férulas respectivas del portal SICAT seleccionando un paciente y haciendo clic en el botón para eliminar pacientes. Después, en la cesta de la compra volverá a tener acceso completo a la recopilación de productos.

32.6 SICAT WEBCONNECTOR

i El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 10 - SIDEXIS 4*].

i En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.


Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, SICAT Suite transfiere los pedidos codificados y en segundo plano a través de SICAT WebConnector. SICAT Endo muestra el estado de las transferencias directamente en la cesta de la compra y puede pausar SICAT WebConnector. SICAT WebConnector reanuda la transferencia cuando se cierra SICAT Suite. Si la carga no se puede llevar a cabo de la forma deseada, puede abrir la interfaz de usuario de SICAT WebConnector.

ABRIR LA VENTANA "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- En el área de notificación de la barra de tareas, haga clic en el símbolo **SICAT Suite WebConnector**.

▶ Se abre la ventana **SICAT Suite WebConnector**:

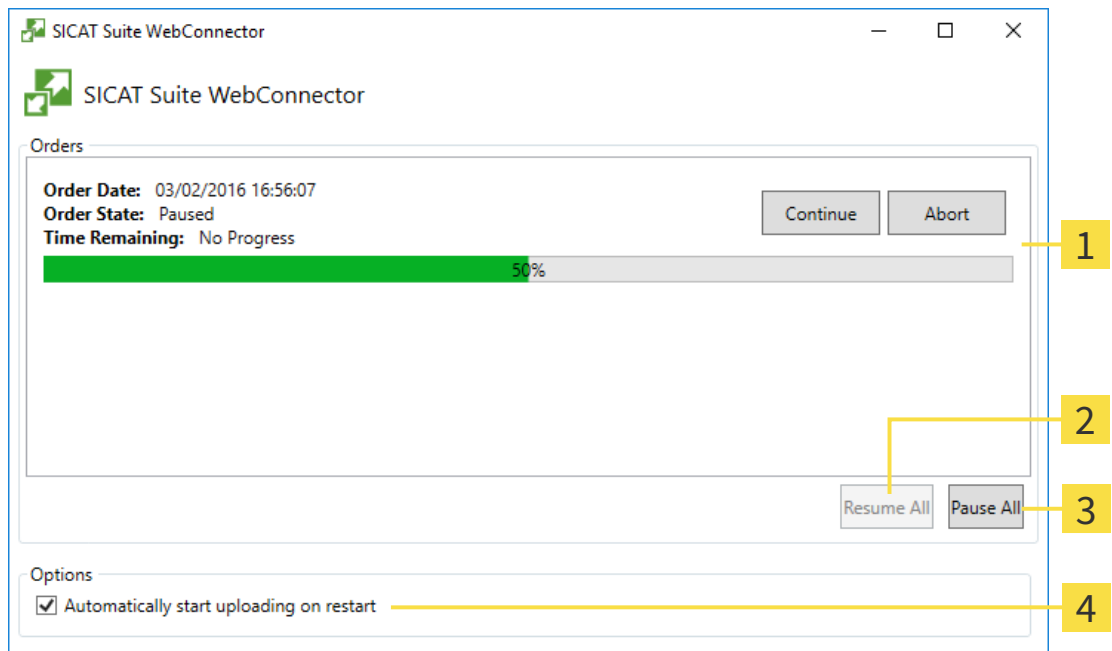

1 Lista **Pedidos**

3 Botón **Detener todos**

2 Botón **Reanudar todos**

4 Casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**

La lista **Pedidos** muestra la cola de espera de los pedidos.

INTERRUMPIR Y CONTINUAR CON LA CARGA

Puede cancelar el proceso de carga. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la conexión a Internet está sobrecargada. Los ajustes solamente se aplican a los procesos de carga en SICAT WebConnector. Los procesos de carga a través de navegador web no se ven afectados.

La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Detener todos**.
 - ▶ SICAT WebConnector interrumpe la carga de todos los pedidos.
2. Haga clic en el botón **Reanudar todos**.
 - ▶ SICAT WebConnector reanuda la carga de todos los pedidos.

DESACTIVAR LA REANUDACIÓN AUTOMÁTICA TRAS UN REINICIO

Puede impedir que SICAT WebConnector reanude automáticamente la carga después de reiniciar Windows.

La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

- Desactive la casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**.
- ▶ Cuando reinicie su PC, SICAT WebConnector ya no reanudará automáticamente la carga de sus pedidos.

32.7 FINALIZAR EL PEDIDO SIN UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite no puede establecer conexión al servidor de SICAT, SICAT Suite abre la ventana **Error al conectar con el servidor de SICAT**. La ventana le muestra una de las siguientes causas del problema:


- **No hay ninguna conexión a Internet disponible. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**
- **El portal SICAT no está disponible**
- **No está instalado el servicio "SICATWebConnector"**
- **No se ha iniciado el servicio "SICATWebConnector"**
- **Se ha producido un error desconocido. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**

Este capítulo tan solo muestra las capturas de pantalla en caso de que no tenga conexión a Internet. En las causas encontrará los posibles pasos para solucionar el problema.

De manera alternativa a la solución de fallos, puede cargar un pedido a través de un navegador en otro PC con conexión a Internet activa. Para los pedidos mediante el navegador, SICAT Suite exporta todos los productos de la cesta de la compra a la vez y crea una subcarpeta por paciente. En cada subcarpeta hay un archivo XML con los datos para el pedido y una carpeta ZIP con los datos que SICAT necesita para la producción. En el portal SICAT puede cargar sucesivamente el archivo XML y la carpeta ZIP. La transferencia está encriptada.

Para finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:


- El PC en el que se ejecuta SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet.
- Una ventana muestra el siguiente mensaje: **Error al conectar con el servidor de SICAT**

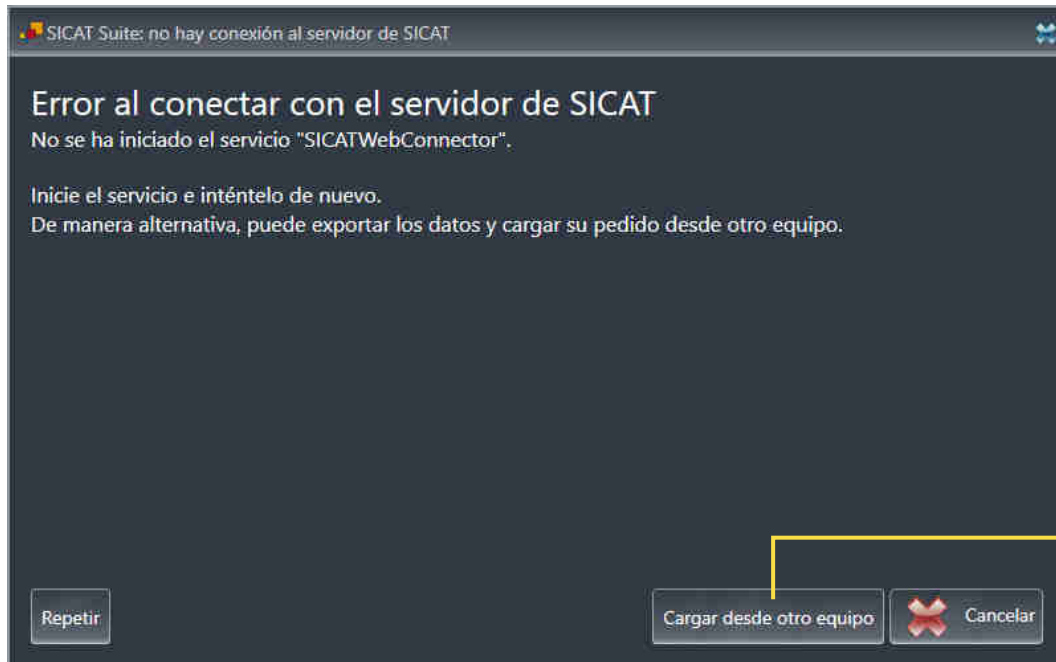

1 Botón **Cargar desde otro equipo**

1. Haga clic en el botón **Cargar desde otro equipo**.

► Se abre la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**:

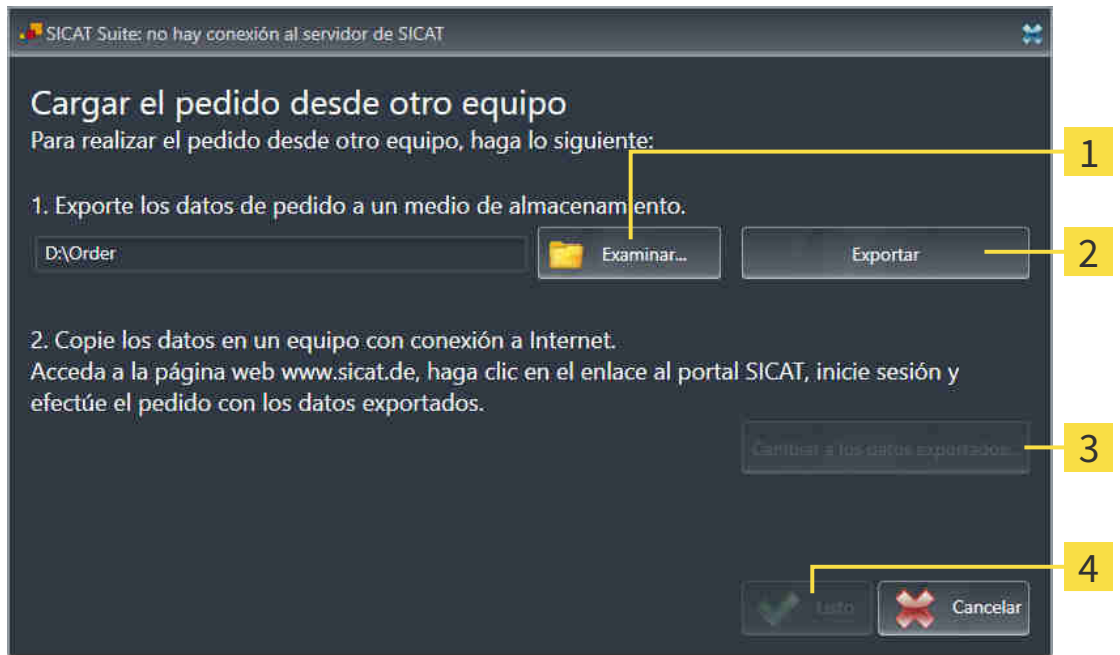

1 Botón **Examinar**


3 Botón **Cambiar a los datos exportados**

2 Botón **Exportar**

4 Botón **Listo**

2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
3. Elija un directorio que ya exista o cree uno nuevo y haga clic en **OK**. Tenga en cuenta que la ruta del directorio no puede tener más de 160 caracteres.
4. Haga clic en el botón **Exportar**.
 - SICAT Suite exporta, a la carpeta indicada, todos los datos necesarios para pedir el contenido de la cesta de la compra. Al hacerlo, SICAT Suite crea una subcarpeta para cada paciente.
5. Haga clic en el botón **Cambiar a los datos exportados**.

- ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows que muestra el directorio con los datos exportados:

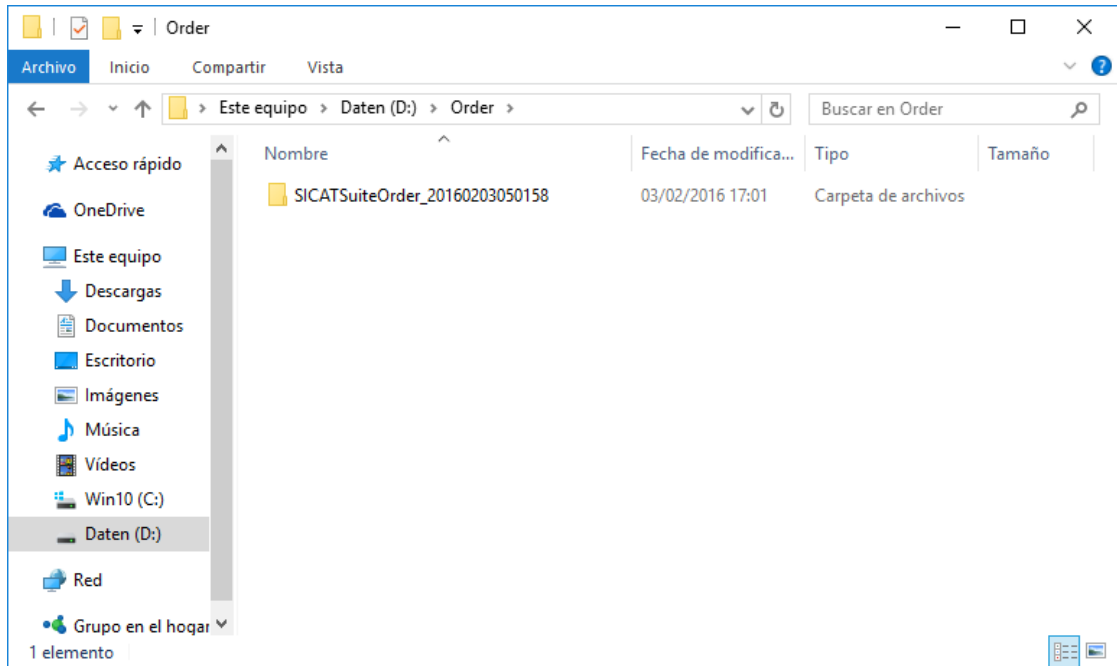

6. Copie la carpeta que contiene los datos de la férula deseada a un PC con una conexión activa a Internet utilizando, por ejemplo, una memoria extraíble USB.
7. En la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**, haga clic en **Listo**.
 - ▶ SICAT Suite cierra la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**.
 - ▶ SICAT Suite elimina de la cesta de la compra todos los productos contenidos en el pedido.
8. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.de>.
9. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - ▶ Se abrirá el portal SICAT.
10. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
11. Haga clic en el enlace para cargar el pedido.
12. Seleccione el pedido deseado en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo XML cuyo nombre empieza por **SICATSuiteOrder**.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra el paciente contenido, el respectivo producto y el precio.
13. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 179 - SIDEXIS 4*].
14. Haga clic en el enlace para cargar los datos de planificación del producto.

15. Seleccione los datos del producto adecuados en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo ZIP que se encuentra en la misma carpeta que el archivo XML que se ha cargado antes y cuyo nombre empieza por **SICATSuiteExport**.
- ▶ Cuando haya realizado el pedido, su navegador transferirá el archivo con los datos del producto al servidor SICAT a través de una conexión a Internet encriptada.



SICAT Suite no elimina automáticamente los datos exportados. Al finalizar un proceso de pedido, por motivos de seguridad debería eliminar manualmente los datos exportados.

33 AJUSTES



Las versiones de SICAT Suite conectadas a SIDEXIS adoptan muchos ajustes de SIDEXIS. Los valores de esos ajustes pueden visualizarse en SICAT Endo, pero solo pueden modificarse en los ajustes de SIDEXIS.

Puede modificar o ver los ajustes generales en la ventana **Ajustes**. Después de hacer clic en el grupo **Ajustes**, el menú de la izquierda muestra los botones siguientes:

- **Generalidades** - Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 187 - SIDEXIS 4*].
- **Licencias** - Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 44 - SIDEXIS 4*].
- **Consulta** - ver o modificar el logotipo y el texto informativo de su consulta, por ejemplo para la utilización en impresiones. Encontrará información sobre ello en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 191 - SIDEXIS 4*].
- **Visualización** - modificar los ajustes de visualización generales. Encontrará información sobre ello en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 192 - SIDEXIS 4*].

Si modifica ajustes, SICAT Endo adopta las modificaciones de inmediato y guarda los ajustes en su perfil de usuario.



Los ajustes de SICAT Suite se aplican al usuario activo de la estación de trabajo actual. SICAT Suite lleva a cabo cambios en los ajustes de forma inmediata. Si cambia a otra categoría de los ajustes, SICAT Suite también guarda de manera permanente los ajustes modificados.


33.1 UTILIZAR AJUSTES GENERALES



Las versiones de SICAT Suite conectadas a SIDEXIS adoptan muchos ajustes de SIDEXIS. Los valores de esos ajustes pueden visualizarse en SICAT Endo, pero solo pueden modificarse en los ajustes de SIDEXIS.

Para abrir los ajustes generales, haga lo siguiente:

1. En la barra de título de SIDEXIS 4, haga clic en el símbolo **Ajustes**.
 - ▶ Se abre la ventana **Ajustes**.
2. Haga clic en el grupo **SICAT Suite**.
 - ▶ Se abre el grupo **SICAT Suite**.
3. Haga clic en el botón **Generalidades**.
 - ▶ Se abre la ventana **Generalidades**:

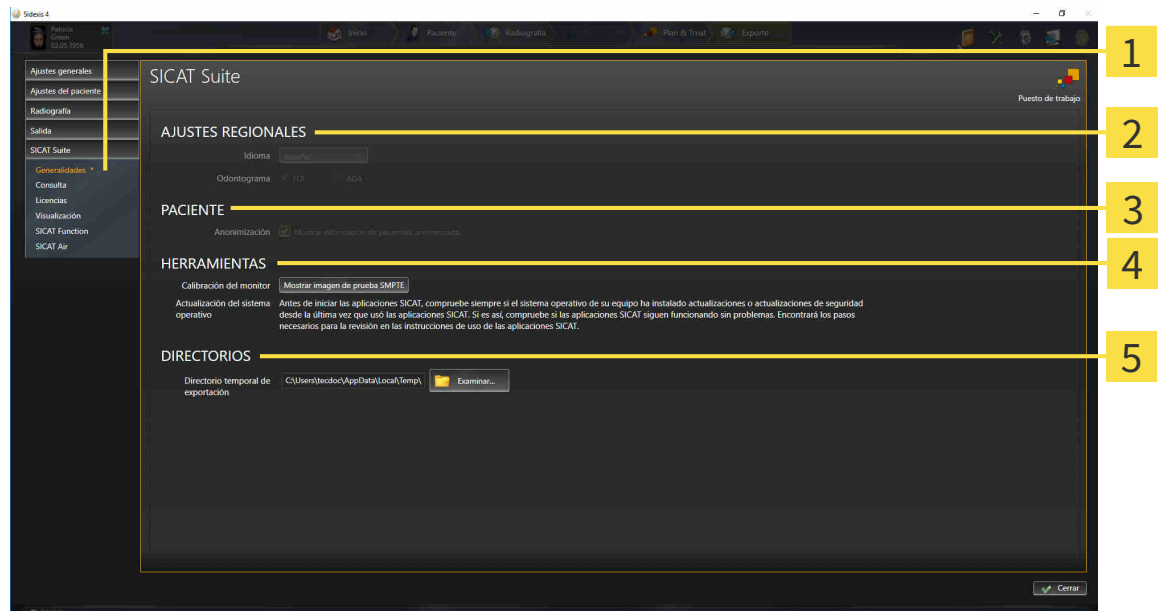

1 Pestaña **Generalidades**

4 Área **HERRAMIENTAS**

2 Área **AJUSTES REGIONALES**

5 Área **DIRECTORIOS**

3 Área **PACIENTE**

SICAT Endo adopta los siguientes ajustes de SIDEXIS, que puede ver aquí:

- En el área **AJUSTES REGIONALES**, puede ver el idioma de la interfaz de usuario en la lista **Idioma**.
- En el área **AJUSTES REGIONALES**, puede ver el odontograma actual en **Odontograma**.
- En el área **PACIENTE**, puede ver el estado de la casilla de comprobación **Mostrar información de pacientes anonimizada**. Si la casilla de comprobación está activada, SICAT Endo adopta los datos de paciente anonimizados de SIDEXIS.

Puede cambiar el siguiente ajuste:

- En el área **DIRECTORIOS**, puede indicar una carpeta en el campo **Directorio temporal de exportación** en la que SICAT Suite guardará los datos de pedido. Debe tener acceso completo a esta carpeta.

Además de visualizar o modificar los ajustes generales, puede abrir la imagen de prueba SMPTE para calibrar su monitor:

- En **HERRAMIENTAS, Calibración del monitor**, haga clic en el botón **Mostrar imagen de prueba SMPTE** para calibrar el monitor. Encontrará información sobre ello en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [▶ *Página 189 - SIDEXIS 4*].



Si en SIDEXIS selecciona un idioma no admitido por SICAT Endo, la interfaz de usuario de SICAT Endo muestra textos en inglés.



Los odontogramas admitidos son FDI y ADA.

33.2 CALIBRACIÓN DEL MONITOR CON LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

PRECAUCIÓN


Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Cuatro propiedades principales determinan si su monitor es adecuado para mostrar datos en aplicaciones SICAT:

- Brillo
- Contraste
- Resolución espacial (linealidad)
- Distorsión (aliasing)

La imagen de prueba SMPTE es una imagen de referencia que le ayudará a comprobar las propiedades de su monitor:

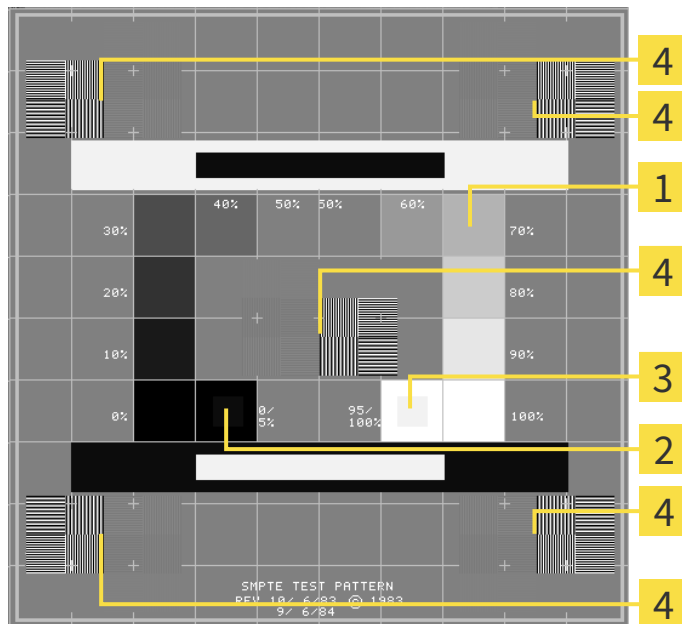

1 Cuadrados de niveles de gris

2 Cuadrado del 0%

3 Cuadrado del 100%

4 Cuadrados que contienen un patrón de barras con un alto contraste

COMPROBAR EL BRILLO Y EL CONTRASTE

En el centro de la imagen de prueba SMPTE, una serie de cuadrados muestran la gradación de los distintos niveles de gris desde el negro (0% de brillo) hasta el blanco (100% de brillo):

- El cuadrado del 0% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 0% y el 5%.
- El cuadrado del 100% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 95% y el 100%.

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- La imagen de prueba SMPTE ya está abierta.
 - Compruebe si en el cuadrado del 0% y en el del 100% puede ver la diferencia visual entre el cuadrado interior y el exterior. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.



Muchos monitores solamente pueden mostrar la diferencia de brillo en el cuadrado del 100% y no en el cuadrado del 0%. Puede reducir la luz ambiental para facilitar la diferenciación de los distintos niveles de brillo en el cuadrado del 0%.

COMPROBAR LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y LA DISTORSIÓN

En las esquinas y en el centro de la imagen de prueba SMPTE, 6 cuadrados muestran un patrón de barras con un alto contraste. En relación con la resolución espacial y la distorsión, debería poder distinguir entre líneas horizontales y verticales con distintas anchuras y que se alternan en blanco y negro:

- De grueso a fino (6 píxeles, 4 píxeles, 2 píxeles)
- Horizontal y vertical

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- En los 6 cuadrados que muestran un patrón de barras con alto contraste, compruebe si puede diferenciar todas las líneas. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.

CERRAR LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

Para cerrar la imagen de prueba SMPTE, haga lo siguiente:

- Pulse la tecla **ESC**.
- ▶ La imagen de prueba SMPTE se cierra.


33.3 UTILIZAR INFORMACIÓN DE LA CONSULTA

Las versiones de SICAT Suite conectadas a SIDEXIS adoptan el logo de la consulta y el texto informativo de SIDEXIS. Por eso, solamente puede ver los valores de estos ajustes en los ajustes de SICAT Suite. Realice las modificaciones de estos ajustes que desee en SIDEXIS.

Las aplicaciones de SICAT Suite utilizan la información aquí mostrada para personalizar impresiones o archivos PDF.

Para abrir la información de la consulta, haga lo siguiente:

1. En la barra de título de SIDEXIS 4, haga clic en el símbolo **Ajustes**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.
2. Haga clic en el grupo **SICAT Suite**.
▶ Se abre el grupo **SICAT Suite**.
3. Haga clic en el botón **Consulta**.
▶ Se abre la ventana **CONSULTA**:

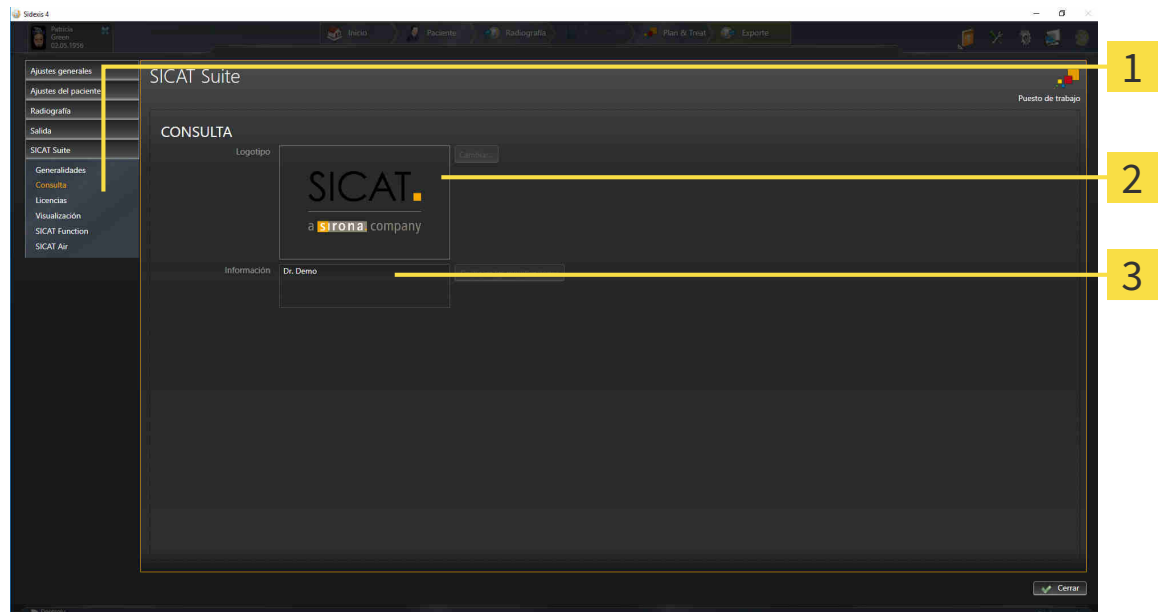

1 Pestaña **Consulta**

2 Área **Logotipo**

3 Área **Información**

Puede ver los siguientes ajustes:

- En el área **Logotipo** puede ver el logotipo de su consulta.
- En el área **Información** puede ver un texto que identifique a su consulta, por ejemplo el nombre y la dirección.

33.4 MODIFICAR LOS AJUSTES DE VISUALIZACIÓN



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.



PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.


1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Los ajustes de visualización determinan la visualización del volumen, de los objetos de diagnóstico y de los objetos planificados en todas las aplicaciones SICAT.

Para abrir la ventana **Visualización**, haga lo siguiente:

1. En la barra de título de SIDEXIS 4, haga clic en el símbolo **Ajustes**.
 - ▶ Se abre la ventana **Ajustes**.
2. Haga clic en el grupo **SICAT Suite**.
 - ▶ Se abre el grupo **SICAT Suite**.
3. Haga clic en el botón **Visualización**.

► Se abre la ventana **Visualización**:

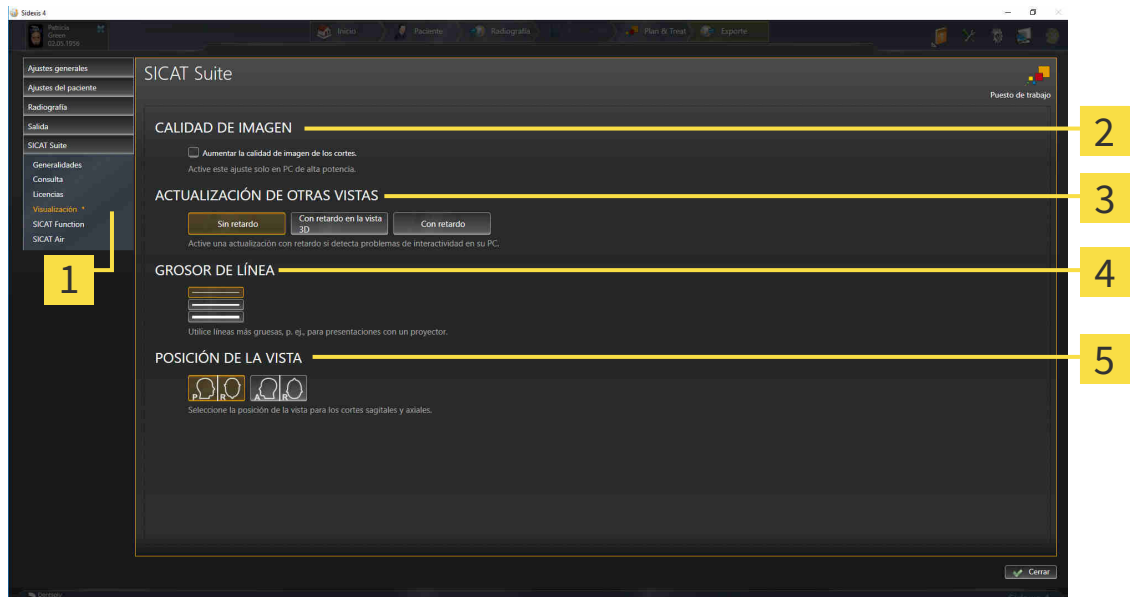

1 Pestaña **Visualización**

4 Área **GROSOR DE LÍNEA**

2 Área **CALIDAD DE IMAGEN**

5 Área **POSICIÓN DE LA VISTA**

3 Área **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS**

Los ajustes son:

- **Aumentar la calidad de imagen de los cortes** - mejora la calidad de la visualización de cortes, ya que el software promedia cortes adyacentes. Active este ajuste solo en PC de alta potencia.
- **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS** - la actualización con retardo mejora la interactividad de la vista activa, pero a costa de un retardo en la actualización de otras vistas. Active la actualización con retardo solo si detecta problemas de interactividad en su PC.
- **GROSOR DE LÍNEA** - modifica el grosor de las líneas. Las líneas más gruesas son útiles para las presentaciones con proyector.
- **POSICIÓN DE LA VISTA** - cambia la posición de la vista de corte **Axial** y de la vista de corte **Sagital**.


34 SERVICIO DE ASISTENCIA

SICAT ofrece las siguientes opciones de asistencia:

- Documentos PDF
- Contacto
- Información sobre el SICAT Suite y las aplicaciones SICAT instalados

Continúe con la siguiente acción:

- *Abrir opciones de asistencia* [▶ *Página 195 - SIDEXIS 4*]

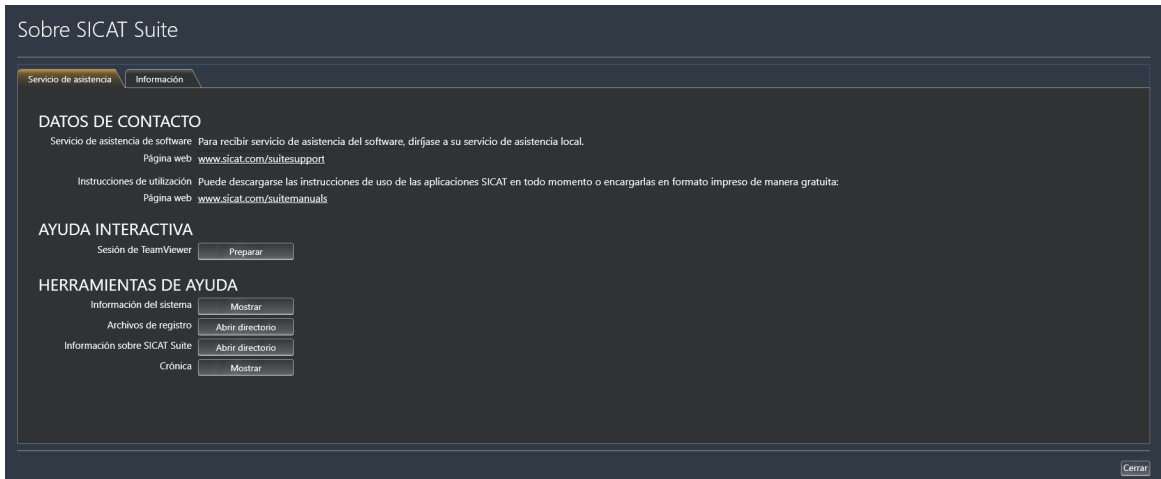

34.1 ABRIR OPCIONES DE ASISTENCIA

Para abrir la ventana **Información sobre SICAT Suite**, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el símbolo **Ayuda**.
2. Haga clic en la opción **Información sobre SICAT Suite**.


► Se abre la ventana **Información sobre SICAT Suite**.

La ventana **Información sobre SICAT Suite** se compone de las siguientes pestañas:

- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [► *Página 194 - SIDEXIS 4*].
- **Información** - Encontrará información sobre ello en *Información* [► *Página 197 - SIDEXIS 4*].

34.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO Y HERRAMIENTAS DE AYUDA

La ventana **Servicio de asistencia** contiene toda la información y todas las herramientas relevantes para que el servicio de asistencia de SICAT pueda ayudarle:

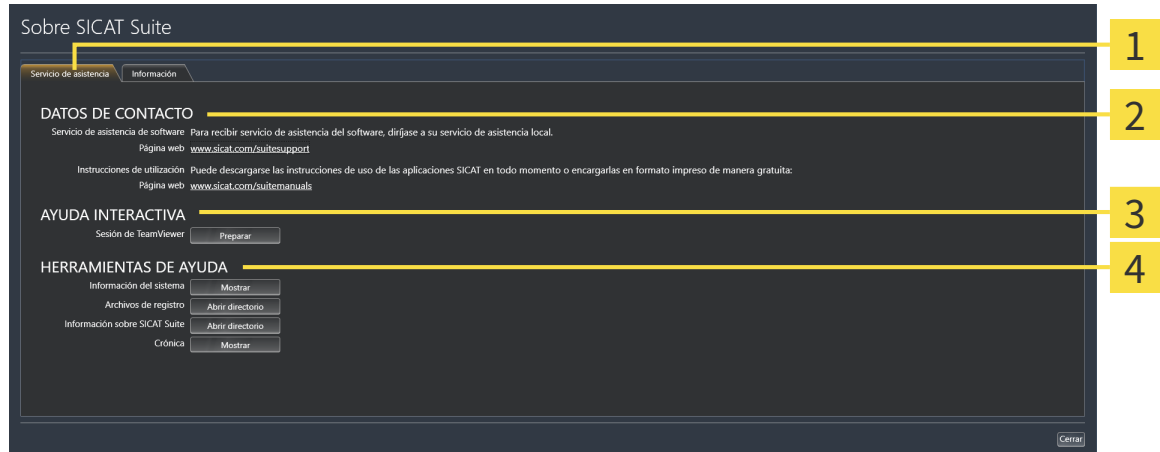

1 Pestaña **Servicio de asistencia**

3 Área **AYUDA INTERACTIVA**

2 Área **DATOS DE CONTACTO**

4 Área **HERRAMIENTAS DE AYUDA**

En el área **DATOS DE CONTACTO** se indica dónde encontrar instrucciones de utilización.

En el área **AYUDA INTERACTIVA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Preparar** del área **Sesión de TeamViewer**, SICAT Endo abre una sesión de TeamViewer.


TeamViewer es un software que permite controlar comandos del ratón y del teclado a distancia y transferir el contenido de la pantalla de un PC a través de una conexión activa a Internet. TeamViewer establece una conexión solamente con su autorización expresa. Para ello, transmite una ID de TeamViewer y una contraseña al servicio de asistencia de SICAT. Esto permitirá que el servicio de asistencia de SICAT le ayude directamente in situ.

En el área **HERRAMIENTAS DE AYUDA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Mostrar** del área **Información del sistema**, SICAT Endo abre la información de sistema del sistema operativo.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Archivos de registro**, SICAT Endo abre el directorio de registro de SICAT Suite en una ventana del explorador de archivos de Windows.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Información sobre SICAT Suite**, SICAT Endo exporta información sobre la instalación actual a un archivo de texto.
- Después de hacer clic en el área **Información sobre SICAT Suite** en el botón **Mostrar notificaciones**, SICAT Endo muestra la ventana de notificaciones.

34.3 INFORMACIÓN

La ventana **Información** muestra información sobre SICAT Suite y todas las aplicaciones SICAT instaladas en varias pestañas:

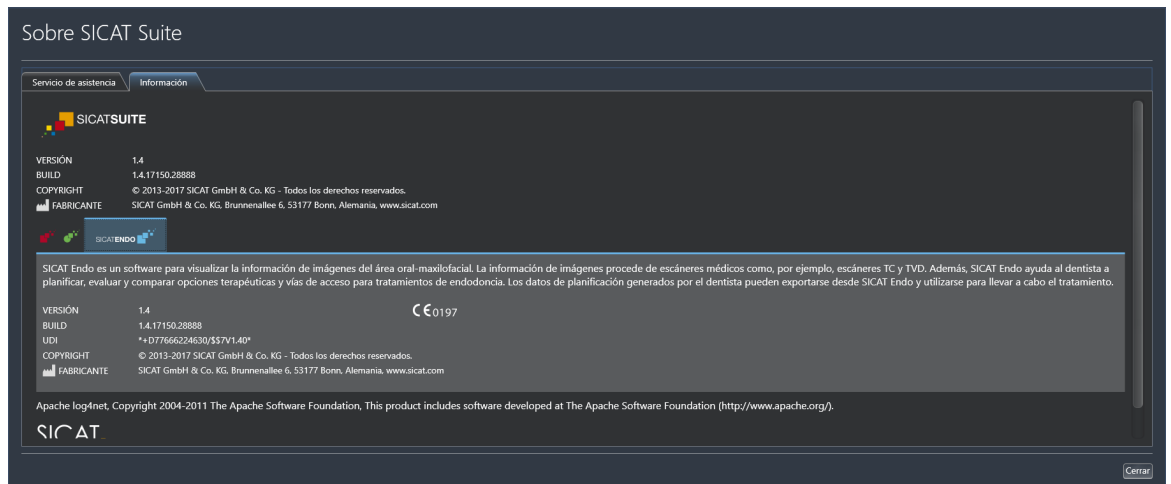

35 ABRIR DATOS PROTEGIDOS CONTRA ESCRITURA

Puede abrir datos protegidos contra escritura.

El estado de la licencia determina qué datos pueden verse en SICAT Endo como módulo de SIDEXIS 4 sin poder realizar ni guardar cambios:

TIPO DE LICENCIA SICAT ENDO	¿ES POSIBLE VISUALIZAR SIN REALIZAR CAMBIOS?
Nunca	No
Viewer	Sí
Versión completa	No

En los siguientes casos, puede ver estudios de SICAT Endo también sin licencia del Viewer:

- Exporte estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4 e importe los datos en SIDEXIS en otro PC. SICAT Endo debe estar instalado en este PC.
- Cree un paquete Wrap&Go que contenga estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4. Instale el paquete Wrap&Go en otro PC. Después, instale SICAT Endo.

En ambos casos, no podrá realizar o guardar cambios en la planificación.



Si el PC en el que funcionan SIDEXIS 4 y SICAT Suite se encuentra en un entorno de red y tanto SIDEXIS 4 como la configuración de red lo permiten, SIDEXIS 4 podría formar parte de una instalación de multiestación de trabajo. Esto puede tener como consecuencia, entre otras cosas, que otras estaciones de trabajo le quiten los derechos de escritura para juegos de datos abiertos. En tal caso, SIDEXIS 4 cierra inmediatamente el juego de datos y los cambios en los estudios SICAT Endo ya no pueden guardarse.

Para abrir datos sin poder realizar ni guardar cambios, haga lo siguiente:

- Inicie SICAT Suite junto con una radiografía 3D de Sirona SIDEXIS 4. Encontrará información sobre ello en *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 39 - SIDEXIS 4*].
- ▶ SICAT Suite abre la radiografía 3D y los proyectos de planificación de la exploración de SIDEXIS 4 actual.
- ▶ Si no hay nada que se oponga a ello, SICAT Endo adopta la alineación del volumen y la curva panorámica de SIDEXIS 4. Encontrará información sobre ello en *Alineación de volumen y área panorámica* [▶ *Página 92 - SIDEXIS 4*].



Deben cumplirse las siguientes condiciones para que pueda adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica:

- Ha activado una licencia con la que puede abrir radiografías 3D o estudios de SICAT Endo. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 44 - SIDEXIS 4*].
- Para la radiografía 3D, no hay objetos que pudieran verse afectados por una modificación de la alineación del volumen o la curva panorámica en ningún estudio de solo lectura correspondiente de SICAT Function o cualquier otra aplicación de SICAT.

Si no se dan las condiciones, SICAT Endo desactiva en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** los botones y elementos de control que puede utilizar para realizar cambios en la alineación del volumen o la curva panorámica.

36 CERRAR SICAT ENDO

Para cerrar SICAT Endo, haga lo siguiente:



- En el área de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Cerrar**.
 - ▶ SICAT Suite guarda la historia clínica activa del paciente.
 - ▶ SICAT Suite cierra todas las aplicaciones SICAT.
 - ▶ SICAT Suite cierra la historia clínica activa del paciente.

37 CERRAR SICAT SUITE



- En la esquina superior izquierda del estudio actualmente abierto, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ SICAT Suite se cierra.
- ▶ SICAT Suite guarda en SIDEXIS 4 los proyectos de planificación modificados de todas las aplicaciones SICAT que se están ejecutando como versión completa.

38 MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO



Al situar el puntero del ratón sobre determinadas funciones, SICAT Endo muestra junto al nombre de la función el método abreviado de teclado entre paréntesis.

En todas las aplicaciones SICAT están disponibles los siguientes métodos abreviados de teclado:

MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO	DESCRIPCIÓN
A	Añadir medición de ángulo
D	Añadir medición de distancia
F	Enfocar un objeto activo
Ctrl + C	Copiar el contenido de la vista activa en el portapapeles
Ctrl + Z	Deshacer la última acción de objeto
Ctrl + Y	Volver a realizar la última acción de objeto deshecha
Supr	Eliminar el objeto activo o grupo de objetos activo
ESC	Cancelar la acción actual (por ejemplo, añadir una medición)
F1	Abrir la ventana Servicio de asistencia , abrir las instrucciones de utilización con la aplicación de SICAT activa

39 DESINSTALAR SICAT SUITE



El programa de desinstalación de SICAT Suite conserva las licencias activas en su PC. Por esa razón, antes de la desinstalación el programa de instalación de SICAT Suite avisa de que no elimina automáticamente las licencias. Si ya no desea utilizar SICAT Suite en ese PC, desactive las licencias antes de la desinstalación. Encontrará más información al respecto en *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 51 - SIDEXIS 4*].



Antes de desinstalar SICAT Suite, asegúrese de que SICAT WebConnector ha terminado de cargar todos los pedidos, ya que el programa de desinstalación cierra automáticamente SICAT WebConnector. Encontrará más información al respecto en *SICAT WebConnector* [▶ *Página 180 - SIDEXIS 4*].

Para desinstalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

- SICAT WebConnector ha cargado correctamente todos los pedidos.
- 1. En el **Panel de control** de Windows, haga clic en **Programas y funciones**.
 - ▶ Se abre la ventana **Programas y funciones**.
- 2. En la lista, elija la opción **SICAT Suite**, que contiene la versión de SICAT Suite.
- 3. Haga clic en el botón **Desinstalar**.
 - ▶ El programa de desinstalación se inicia y se abre la ventana **PROGRESO**:



- Una vez terminada la desinstalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**:



4. Haga clic en el botón **Finalizar**.

- El programa de desinstalación de SICAT Suite se cierra.



Para abrir el programa de desinstalación de SICAT Suite, puede iniciar también el programa de instalación de SICAT Suite en un PC en el que ya está instalado SICAT Suite.



El programa de desinstalación de SICAT Suite abre los programas de desinstalación de algunos requisitos de software que se han instalado junto con SICAT Suite. Si otras aplicaciones instaladas siguen necesitando los requisitos de software, estos se conservan.

40 NOTAS SOBRE SEGURIDAD

RADIOGRAFÍAS 3D



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.



PRECAUCIÓN

El uso de otros datos que no sean las radiografías 3D como fuentes de información para la planificación de una terapia basada en las mediciones podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice las radiografías 3D para el diagnóstico y la planificación si utiliza la funcionalidad de medición.

RADIOGRAFÍAS INTRAORALES



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas para el registro de radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice únicamente radiografías 3D que solo contengan pocos artefactos o ninguno.
2. Utilice solo radiografías 3D que cuenten con una resolución lo suficientemente alta.




PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no coincidan con el paciente ni con la radiografía 3D o cuyo momento de adquisición diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que, en una radiografía intraoral, coincidan el paciente y la radiografía 3D, y de que el momento de adquisición no diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D.

-  **PRECAUCIÓN** **Una orientación incorrecta de las radiografías intraorales en relación con las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
1. Compruebe que las radiografías intraorales registradas estén correctamente adaptadas a la radiografía 3D.
 2. En caso necesario, gire las radiografías intraorales para orientarlas correctamente.
-  **PRECAUCIÓN** **Las radiografías intraorales que no se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Compruebe que las radiografías intraorales se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D.
-  **PRECAUCIÓN** **Los dispositivos para radiografías intraorales no aprobados como productos médicos podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Asegúrese de utilizar para las radiografías intraorales únicamente dispositivos aprobados como productos médicos.
-  **PRECAUCIÓN** **La integridad o calidad insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Compruebe la integridad y la calidad de las radiografías intraorales importadas.
-  **PRECAUCIÓN** **Una calidad insuficiente de las radiografías intraorales o las radiografías 3D podrían conllevar que el mecanismo de registro de las radiografías intraorales fallara.**
- Utilice únicamente radiografías intraorales y radiografías 3D que permitan un registro correcto.
-  **PRECAUCIÓN** **La calidad y la precisión insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Utilice únicamente radiografías intraorales que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.
-  **PRECAUCIÓN** **Una posición u orientación incorrecta de las radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Después del registro, compruebe la correcta posición y orientación de las radiografías intraorales con los dientes en la radiografía 3D.

CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

-  **PRECAUCIÓN** **Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.


PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

GESTIÓN DE DATOS


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.


PRECAUCIÓN

La eliminación de datos originales podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

No elimine los datos originales tras la importación.


PRECAUCIÓN

La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.


PRECAUCIÓN

Si elimina historias clínicas, todas las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos también se eliminarán.

Elimine historias clínicas únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos.


PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.


PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

SEGURIDAD



Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.



Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.



Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE



Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.



Los medios de instalación dañados podrían hacer que la instalación fallara.

Trate los medios de instalación con cuidado y almacénelos de forma adecuada.



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.



PRECAUCIÓN

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.



PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

PEDIDOS



PRECAUCIÓN

El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.

Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.



PRECAUCIÓN

Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

IMPRESIONES ÓPTICAS



PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.



PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.



PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.



PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.



PRECAUCIÓN

Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.



PRECAUCIÓN

La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.



PRECAUCIÓN

Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.

RED



PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.



PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.



PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.

ODONTOGRAMA



PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta de los números de dientes podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que coincidan los números de dientes seleccionados y los números de dientes anatómicos reales.

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN



PRECAUCIÓN

Una profundidad de perforación incorrecta puede conllevar un tratamiento incorrecto.

Asegúrese de que la profundidad de perforación y el taladro seleccionado coincidan.

OBJETOS PLANIFICADOS



PRECAUCIÓN

El uso de la vista 3D para visualizar mediciones y objetos de planificación podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice la vista 3D únicamente de orientación y como fuente de información adicional.

41 PRECISIÓN

La siguiente tabla muestra los valores de precisión en todas las aplicaciones SICAT:

Exactitud de la medida para las mediciones de distancias	< 100 µm
Exactitud de la medida para las mediciones de ángulos	< 1 grado
Precisión de la visualización	< 20 µm

GLOSARIO

ADA

American Dental Association (Asociación Dental Americana)

Aplicación

Las aplicaciones SICAT son programas que pertenecen a SICAT Suite.

Canal de perforación

Tomando como base la vía planificada para la perforación del EndoLine, que puede representarse gráficamente y editarse en el software.

CPR

Curved Planar Reformation, proceso de reconstrucción bidimensional de imágenes de radiografías 3D que se aplica para facilitar la representación de estructuras complejas.

EndoLine

Un EndoLine es una línea de medición multifuncional que sirve para marcar el canal de la raíz a tratar y para localizar la punta de la raíz.

FDI

Fédération Dentaire Internationale, Federación Dental Internacional

Foco

Círculo destacado en una sección de una imagen para comprobar la superposición de la radiografía intraoral y la proyección en 3D en el marco del registro de radiografías intraorales.

Impresiones ópticas

Una impresión óptica es el resultado de una adquisición superficial 3D de dientes, materiales de impresión o modelos de yeso.

Marco

En la vista 3D, los marcos muestran las posiciones de las vistas de corte 2D.

Portal SICAT

El portal SICAT es una página de Internet en la que puede pedir, entre otros elementos, férulas a SICAT.

Radiografía intraoral

Una radiografía intraoral es una radiografía 2D de dientes concretos que se toma con ayuda de una película dental detrás del diente y una fuente de rayos X fuera de la boca, y se caracteriza por una alta precisión de los detalles.

Registro

Alineación espacial

Retículos

Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte.

SIXD

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (sociedad de ingenieros cinematográficos y de televisión)

SSI

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

STL

Surface Tessellation Language, formato de archivo estándar para intercambiar datos de malla que pueden contener, por ejemplo, impresiones ópticas.

Ventana de notificación

La ventana de notificación muestra, en el margen inferior derecho de la pantalla, mensajes sobre procesos terminados.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A			
Abrir datos protegidos contra escritura	198	Crear para impreso	166
Ajustes	186	Realizar a partir de áreas de trabajo	71
Modificar los ajustes de visualización	192	Cerrar	201
Visualizar o modificar información de la consulta	191	Cerrar SICAT Endo	200
Visualizar o modificar los ajustes generales.	187	Cesta de la compra	
Alineación de volumen	92	Abrir	176
Ajustar	95	Colocar EndoLines	142
Área de trabajo de radiografías intraorales		Utilizar botón del ratón	142
Informaciones generales	68		
Área panorámica	93	D	
Ajustar	100	Desinstalación	203
Áreas de trabajo	65		
Ajustar	70	E	
Añadir capturas de pantalla a la edición de SIDEXIS 4	71	EndoLine	
Cambiar	69	Ajustar color y texto	144
Crear capturas de pantalla	71	Añadir puntos de control	145
Panorámica	67	Borrar puntos de control	145
Radiografía intraoral	68	Desplazar puntos de control	145
Restablecer	70	Editar	142
Asistente de EndoLine	131	EndoView	137
Canal de perforación	131	Ajustar	142
Colocar EndoLines	142	Girar	138
EndoLine	131	Estudios de SICAT Endo	
EndoView	137	En SIDEXIS4	37
Orientar previamente la región dental	140	Exportación de datos	170
Planificar canales de perforación	151		
Seleccionar diente	139	F	
Vistas	132	Flujo de trabajo	32
Asistente de registro	120		
Poner máscaras en áreas	129	I	
Posicionar previamente la radiografía intraoral	121	Idiomas	17
Registrar la radiografía intraoral	123	Imagen de prueba SMPTE	189
		Imágenes y capturas de pantalla para impresos	
B		Ajustar herramientas de dibujo	165
Barra de herramientas del flujo de trabajo	55	Crear capturas de pantalla	166
		Dibujar círculos	165
C		Dibujar flechas	164
Calibración del monitor	189	Importación en STL	110
Cambiar		Importar	
Aplicaciones	42	Radiografías intraorales	116
Cambiar de aplicación	42	Impresiones ópticas	103
Canales de perforación		Importación en STL	110
Bloquear	151	Importar y registrar	105
Desbloquear	151	Reutilizar a partir de otras aplicaciones SICAT	111
Eliminar	151	Impresos	
Canjear códigos	53	Crear capturas de pantalla	166
Capturas de pantalla		Preparar	167
Crear a partir de vistas	85	Producir	169
		Indicaciones	8
		Información de seguridad	12

Cualificación de los usuarios	14	Portal SICAT	179
Niveles de peligro	13	Transferencia de datos a través de otro PC	182
Informar al paciente	163	Transferencia de datos en segundo plano	178
Instalación	19	Planificar canales de perforación	151
Desinstalación	203	Poner máscaras en áreas	129
Instrucciones de utilización		Portal SICAT	179
Abrir como ayuda online	43	Posicionar previamente la radiografía intraoral	121
Símbolos y estilos	15	Primeros pasos	32
Vista general	16		
Interfaz de usuario		R	
SICAT Endo	54	Radiografía intraoral	
SICAT Suite	41	Asistente de registro	120
		Posicionar previamente	121
L		Registrar	123
Licencias	44	Radiografías intraorales	114
Activar automáticamente	47	Asignar dientes	116
Activar manualmente	49	Importar	116
Canjear códigos	53	Número de diente	116
Devolver al pool de licencias	51	Sensores de radiografías intraorales compatibles	
Mostrar	46	115	
		Registrar la radiografía intraoral	123
M		Adaptar la orientación previa	126
Mediciones		Poner máscaras en áreas	129
Añadir mediciones de ángulos	159	Registrar módulo	
Añadir mediciones de distancias	158	SIDEXIS 4	35
Desplazar	161	Requisitos del sistema	10
Desplazar lecturas	162		
Desplazar puntos de medición	161	S	
Vista general	157	Seleccionar diente	139
Métodos abreviados de teclado	202	Sensores de radiografías intraorales compatibles	115
		Servicio de asistencia	194
O		Abrir ayuda	43
Objetos		Abrir la ventana de asistencia	195
Activar objetos y grupos de objetos	58	Contacto	196
Barra de herramientas del objeto	60	Herramientas	196
Barra de objetos	57	Información de producto	197
Contraer y expandir grupos de objetos	58	SICAT Endo	
Deshacer y rehacer	60	Interfaz de usuario	54
Eliminar	60	SICAT Suite	
Enfocar	60	Cerrar	201
Mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos	59	Iniciar	39
Objetos de SICAT Endo	61	Interfaz de usuario	41
Orientar previamente la región dental	140	SICAT WebConnector	180
		SIDEXIS 4	
P		Añadir capturas de pantalla de áreas de trabajo	71
Particularidades de esta versión	28	Añadir capturas de pantalla de vistas	85
Pasos del flujo de trabajo		Barra de fases	36
Preparar	55	Línea de tiempo	40
Pedido	171	Registrar módulo	35
Carga automática tras un reinicio	181	SIDEXIS4	
Colocar plantilla de perforación en la cesta de la compra	172	Estudios de SICAT Endo	37
Comprobar la cesta de la compra	177		
Interrumpir y continuar con la carga	181	U	
		Uso previsto	8

V

Ventana de exploración	66
Versiones	
Diferencias	28
Vista 3D	86
Cambiar el modo de detalle	91
Cambiar modo de visualización	88
Configurar	89
Modificar la posición	87
Vista general de SICAT Suite	17
Vistas	72
Aplicar el zoom	79
Asistente de EndoLine	132
Barra de herramientas de la vista	73
Brillo y contraste	77
Cambiar	75
Crear capturas de pantalla	85
Desplazar la ventana de exploración	82
Desplazar secciones	79
Desplazarse	80
EndoView	137
Maximizar y restablecer	76
Ocultar y mostrar la ventana de exploración	83
Restablecer	84
Retículos y marcos	81



SICAT ENDO *VERSIÓN 1.4*

Instrucciones de utilización | Español | SIDEXIS XG

ÍNDICE - SIDEXIS XG

1	Usó previsto e indicaciones	6
2	Historial de versiones	7
3	Requisitos del sistema	8
4	Información de seguridad	10
4.1	Definición de los niveles de peligro	11
4.2	Cualificación de los usuarios	12
5	Símbolos y resaltes utilizados	13
6	Vista general de las instrucciones de utilización	14
7	Vista general de SICAT Suite	15
8	Instalar SICAT Suite	17
9	Llevar a cabo los pasos de la verificación tras la actualización del sistema operativo	23
10	Actualizar o reparar SICAT Suite	25
11	Particularidades de esta versión	26
12	Flujo de trabajo estándar de SICAT Endo	28
13	Registrar y eliminar SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG	32
14	Iniciar SICAT Suite	34
15	La interfaz de usuario de SICAT Suite	35
16	Cambiar entre aplicaciones SICAT	37
17	Abrir las instrucciones de utilización	38
18	Licencias	39
18.1	Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"	41
18.2	Activar licencias mediante una conexión activa a Internet	42
18.3	Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet	44
18.4	Devolver licencias al pool de licencias	46
18.5	Canjear códigos	47
19	La interfaz de usuario de SICAT Endo	48
19.1	Barra de herramientas del flujo de trabajo	49
19.2	Barra de objetos	52
19.3	Gestionar objetos con el navegador de objetos	53
19.4	Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto	55
19.5	Objetos de SICAT Endo	56
20	Áreas de trabajo	60
20.1	Vista general del área de trabajo panorámica	61
20.2	Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral	63
20.3	Cambiar el área de trabajo activa	64

20.4	Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo	65
20.5	Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo	66
21	Vistas	67
21.1	Ajustar las vistas.....	68
21.2	Cambiar la vista activa.....	70
21.3	Maximizar y restablecer vistas	72
21.4	Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D	73
21.5	Ampliar vistas y desplazar secciones.....	75
21.6	Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D.....	76
21.7	Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos	77
21.8	Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración.....	78
21.9	Restablecer vistas	80
21.10	Realizar capturas de pantalla de vistas	81
22	Adaptar la vista 3D.....	82
22.1	Modificar la posición de la vista 3D.....	83
22.2	Cambiar el modo de visualización de la vista 3D	84
22.3	Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D.....	85
22.4	Cambiar el modo de detalle de la vista 3D	87
23	Alineación de volumen y área panorámica	88
23.1	Ajustar la alineación del volumen	90
23.2	Ajustar el área panorámica.....	95
24	Impresiones ópticas.....	98
24.1	Importar y registrar impresiones ópticas	99
24.2	Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL.....	105
24.3	Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT	106
25	Radiografías intraorales.....	108
25.1	Sensores de radiografías intraorales compatibles.....	110
25.2	Importar radiografías intraorales y asignar dientes	111
26	Asistente de registro	114
26.1	Posicionar previamente la radiografía intraoral	115
26.2	Registrar la radiografía intraoral.....	117
26.3	Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial	120
26.4	Poner máscaras en áreas.....	123
27	Asistente de EndoLine	125
27.1	Vistas en el asistente de EndoLine	126
27.1.1	EndoView	131
27.1.2	Girar EndoView	132
27.2	Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento.....	133
27.3	Orientar previamente la región dental	134
27.4	Colocar EndoLines	136
27.5	Ajustar color y texto	138

27.6	Añadir, desplazar y borrar puntos de control.....	139
27.7	Girar la vista 3D	142
27.8	Mostrar impresiones ópticas en la vista 3D	143
27.9	Utilizar botón del ratón	144
27.10	Planificar canales de perforación.....	145
28	Mediciones de distancias y ángulos	151
28.1	Añadir mediciones de distancias	152
28.2	Añadir mediciones de ángulos	153
28.3	Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas	155
29	Informar al paciente	157
29.1	Crear imágenes y capturas de pantalla	158
29.2	Preparar impresos	162
29.3	Generar impresos.....	164
30	Exportación de datos	165
30.1	Abrir la ventana "Transferir datos"	166
30.2	Exportar datos.....	167
31	Proceso de pedido	168
31.1	Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra.....	169
31.2	Abrir la cesta de la compra	173
31.3	Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido.....	174
31.4	Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet.....	175
31.5	Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT.....	176
31.6	SICAT WebConnector	177
31.7	Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet.....	179
32	Ajustes.....	183
32.1	Utilizar ajustes generales.....	184
32.2	Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE	186
32.3	Utilizar información de la consulta	188
32.4	Modificar los ajustes de visualización.....	189
33	Servicio de asistencia.....	191
33.1	Abrir opciones de asistencia.....	192
33.2	Información de contacto y herramientas de ayuda	193
33.3	Información	194
34	Abrir datos protegidos contra escritura	195
35	Cerrar SICAT Endo	197
36	Cerrar SICAT Suite	198
37	Métodos abreviados de teclado.....	199
38	Desinstalar SICAT Suite	200
39	Notas sobre seguridad	202

40 Precisión.....	209
Glosario	210
Índice alfabético.....	211

1 *USO PREVISTO E INDICACIONES*

SICAT Endo es un software para visualizar la información de imágenes del área oral-maxilofacial. La información de las imágenes procede de escáneres médicos como, por ejemplo, escáneres TC y TVD. Además, SICAT Endo ayuda al dentista a planificar, evaluar y comparar opciones terapéuticas y vías de acceso para tratamientos de endodoncia. Los datos de planificación generados por el dentista pueden exportarse desde SICAT Endo y utilizarse para llevar a cabo el tratamiento.

INDICACIONES

SICAT Endo es una aplicación de software para:

- Ayuda al diagnóstico en el área oral-maxilofacial
- Ayuda en la comparación de diferentes opciones terapéuticas
- Ayuda en la planificación del tratamiento de la endodoncia
- Ayuda a la planificación del tratamiento para plantillas de perforación endodónticas

2 *HISTORIAL DE VERSIONES*

VERSIÓN 1.4

- Versión inicial

3 REQUISITOS DEL SISTEMA



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

Procesador	Quad Core 2,3 GHz
Memoria de trabajo	8 GB
Tarjeta gráfica	Específica* DirectX 11 o superior 2 GB de memoria gráfica Controlador actual compatible como mínimo con WDDM 1.0
Pantalla	Resolución mínima de 1920 × 1080 píxeles con un escalado del 100 al 125%** Resolución máxima de 3840 × 2160 píxeles con un escalado del 100 al 200%
Memoria libre en el disco duro	20 GB y espacio adicional para juegos de datos
Medios de almacenamiento	Acceso a medio de almacenamiento externo que contiene los archivos de instalación.
Dispositivos de entrada	Teclado, ratón
Red	Ethernet, 100 Mbits/s, se recomiendan 1000 Mbits/s
Impresora para la hoja de información del paciente	300 dpi como mínimo Formato de papel DIN A4 o US Letter
Sistema operativo	Windows 7 SP1 (64 bits) con KB2670838 Windows 8 (64 bits, escritorio) Windows 8.1 (64 bits, escritorio) Windows 10 (64 bits, escritorio)
Navegador web	Microsoft Internet Explorer 11 o superior Mozilla Firefox 39 o superior Google Chrome 44 o superior JavaScript debe estar activado. Debe seleccionarse el navegador estándar.
Visor de PDF	Por ejemplo, Adobe Reader DC o superior
SIDEXIS XG con SICAT Suite como plugin	Versión 2.6.1 (64 bits)

SIDEXIS 4 con SICAT Suite como módulo	Versión 4.2 SiPlanAPI V4
SIDEXIS 4 con SICAT Suite como plugin	Versión 4.1.2 (64 bits)



*SICAT Suite solo es compatible con tarjetas gráficas dedicadas que tengan un rendimiento igual o superior a la NVIDIA GeForce 960 GTX. Las tarjetas gráficas integradas no son compatibles.

**La combinación de una baja resolución de pantalla y un alto nivel de escalado puede hacer que el software muestre de manera incompleta determinadas partes de la superficie.

La pantalla debe ajustarse de tal manera que muestre correctamente la imagen de prueba SMPTE. Encontrará más información al respecto en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [▶ *Página 186 - SIDEXIS XG*].

REQUISITOS DE SOFTWARE

SICAT Suite necesita los siguientes componentes de software y los instala si no están ya disponibles:

- Microsoft .NET Framework 4.5
- Software de administración de licencias CodeMeter 6.30d
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Los puertos deben estar autorizados en su cortafuegos:

PROTOCOLO	DIRECCIÓN DE LA CONEXIÓN	PUERTO
HTTP	Saliente	80
HTTPS	Saliente	443
FTPS - Dirección	Saliente	21
FTPS - Transferencia de datos	Saliente	49152-65534



Puede también realizar pedidos sin el SICAT WebConnector. Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 168 - SIDEXIS XG*].

4 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Es importante que lea los siguientes capítulos relativos a la seguridad:

- *Definición de los niveles de peligro* [▶ *Página 11 - SIDEXIS XG*]
- *Cualificación de los usuarios* [▶ *Página 12 - SIDEXIS XG*]
- *Notas sobre seguridad* [▶ *Página 202 - SIDEXIS XG*]

4.1 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO

En las presentes instrucciones de utilización se utilizan las siguientes identificaciones de seguridad para evitar lesiones de los usuarios o pacientes y daños materiales:



PRECAUCIÓN

Identifica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como consecuencia pequeñas lesiones.

NOTA

Identifica información que se considera importante, pero no relevante para la seguridad.

4.2 CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



PRECAUCIÓN

El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

Solo el personal con la formación apropiada o debidamente capacitado puede usar el software.

Si lleva a cabo una capacitación o un curso o usa este software en el marco de un curso general, podrá emplear el software solo bajo la supervisión permanente de una persona cualificada.

Para usar el software debe cumplir los siguientes requisitos:

- Haber leído las instrucciones de utilización.
- Estar familiarizado con la estructura básica y las funciones del software.
- Estar en condiciones de detectar fallos de funcionamiento del software y aplicar los pasos adecuados en caso necesario.

5 SÍMBOLOS Y RESALTES UTILIZADOS

SÍMBOLOS

Las presentes instrucciones de utilización emplean el siguiente símbolo:



El símbolo de nota identifica información adicional como, por ejemplo, formas de proceder alternativas.

RESALTES

Los textos y las denominaciones de elementos que presenta SICAT Suite aparecen destacados con fuente **negrita**. Esto incluye los siguientes objetos en la interfaz de usuario:

- Denominaciones de áreas
- Denominaciones de botones
- Denominaciones de símbolos
- Textos de notas y mensajes en la pantalla

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Las instrucciones de operación aparecen en forma de listas numeradas:

- ☑ Los requisitos se identifican con este símbolo.
- 1. Los pasos se identifican con números.
 - ▶ Los resultados intermedios se identifican con este símbolo y están sangrados.
- 2. Después de los resultados intermedios hay más pasos.
 - ▶ Los resultados finales se identifican con este símbolo.
 - Una instrucción que solo consta de un paso se identifica con este símbolo.

6 VISTA GENERAL DE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

SICAT Endo forma parte de SICAT Suite junto con otras aplicaciones.

SICAT Suite es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones SICAT. Por consiguiente, las aplicaciones se instalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - SIDEXIS XG*].

Actualmente SICAT Suite está disponible en tres variantes. Algunas operaciones de manejo son diferentes en función de la variante. Por eso las presentes instrucciones de utilización tratan las variantes de forma separada:

- Módulo de SIDEXIS 4
- Plugin de SIDEXIS XG
- Versión independiente

No es necesario que elija una variante cuando instale SICAT Suite.

Las aplicaciones también se desinstalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Desinstalar SICAT Suite* [▶ *Página 200 - SIDEXIS XG*].

7 VISTA GENERAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

- SICAT Function: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Function en las Instrucciones de utilización de SICAT Function.
- SICAT Air: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Air en las Instrucciones de utilización de SICAT Air.
- SICAT Endo: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Endo en las Instrucciones de utilización de SICAT Endo.

IDIOMAS

SICAT Suite es compatible con los siguientes idiomas en la interfaz de usuario:

- Inglés
- Alemán
- Francés
- Japonés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Portugués
- Ruso

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Para activar una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en PC en los que esté instalado SICAT Suite.

VERSIÓN COMPLETA Y MODO VIEWER

SICAT Suite puede iniciarse en dos modos diferentes:

- Si ha activado la licencia del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en el modo Viewer.
- Si ha activado la licencia completa del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en su versión completa.

En general, se aplica lo siguiente:

- Las aplicaciones con licencia completa activada se inician en su versión completa.
- Las aplicaciones con la licencia del Viewer activada se inician en el modo Viewer.
- Las aplicaciones sin licencia activada no se inician.
- No es necesario que elija un modo cuando instale SICAT Suite.

8 INSTALAR SICAT SUITE

 **PRECAUCIÓN**

Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.

 **PRECAUCIÓN**

Los medios de instalación dañados podrían hacer que la instalación fallara.

Trate los medios de instalación con cuidado y almacénelos de forma adecuada.

 **PRECAUCIÓN**

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

 **PRECAUCIÓN**

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.



La función **Autoarranque** de Windows podría estar desconectada en su PC. En ese caso, puede abrir el medio óptico en el explorador de archivos de Windows e iniciar manualmente el archivo **SICATSuiteSetup.exe**, que contiene en su nombre la versión de SICAT Suite.

Para instalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

Su PC cumple los requisitos del sistema. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [► *Página 8 - SIDEXIS XG*].

1. Introduzca el medio de instalación de SICAT Suite en la unidad de disco óptica de su PC.

► Se abre la ventana **Autoarranque**.

2. En la ventana **Autoarranque**, seleccione la opción **Ejecutar SICATSuiteSetup.exe**, que contiene en su nombre la versión de SICAT Suite.

► Los requisitos de software se instalan si no están ya disponibles en el PC.



- El programa de instalación de SICAT Suite se inicia y la ventana **INTRODUCCIÓN** se abre:



3. Seleccione el idioma que desee para el programa de instalación de SICAT Suite en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **ACUERDO DE LICENCIA**:




4. Lea el contrato de licencia de usuario final en su totalidad, seleccione la casilla de comprobación **Acepto el acuerdo de licencia** y haga clic en **Continuar**.

► Se abre la ventana **OPCIONES**:



5. Para cambiar la carpeta del disco duro donde el programa de instalación de SICAT Suite instala SICAT Suite, haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.
6. Navegue hasta la carpeta deseada en la que el programa de instalación de SICAT Suite tenga que crear el directorio «SICAT Suite» y haga clic en **OK**.
 - El programa de instalación de SICAT Suite inserta la ruta de la carpeta seleccionada en el campo **¿Dónde desea instalar el software**.
7. Si SIDEXIS XG o SIDEXIS 4 está instalado en su PC, la casilla de comprobación **Deseo utilizar SICAT Suite con SIDEXIS** está disponible. Durante la instalación o más adelante, SICAT Suite puede registrarse manualmente como plugin de SIDEXIS XG o como módulo de SIDEXIS 4.
 - Si la casilla de comprobación **Deseo utilizar SICAT Suite con SIDEXIS** está activada, la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio** no está disponible.
8. Si está disponible, active o desactive la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio**.
9. Haga clic en el botón **Instalar**.

- ▶ Se abre la ventana **PROGRESO**:

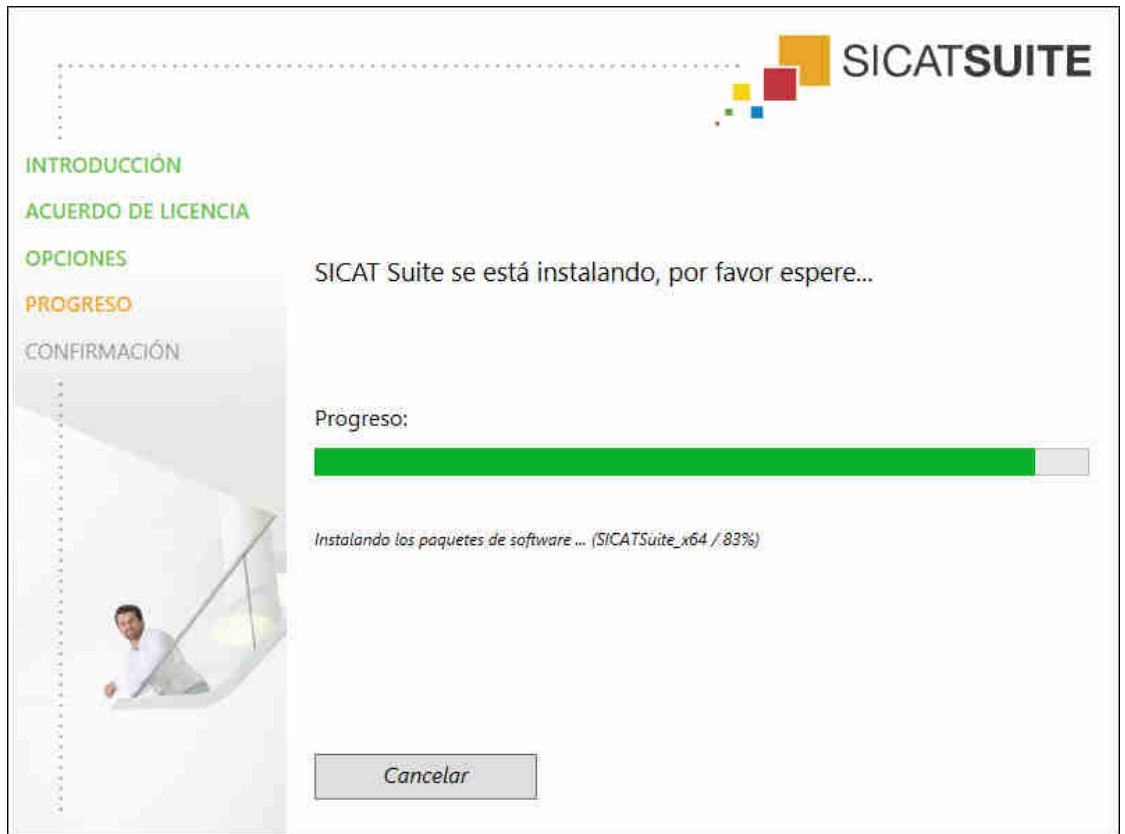

- ▶ Se instalan SICAT Suite y los requisitos de software restantes.
- ▶ Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**:



10. Haga clic en el botón **Finalizar**.

▶ El programa de instalación de SICAT Suite se cierra.

9 LLEVAR A CABO LOS PASOS DE LA VERIFICACIÓN TRAS LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO


PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones, deberá asegurar que SICAT Endo funcione sin problemas. Lleve a cabo los siguientes pasos de la verificación. Si detecta diferencias en un paso de la verificación, impida el que se siga usando SICAT Endo en el PC afectado y póngase en contacto con la asistencia SICAT.


PREPARATIVOS

1. Parar asegurar que nadie haya realizado cambios de forma accidental, elimine el paciente «Patient Axx».
2. Importe el juego de datos de referencia del archivo «SICATSuite_ReferenceDataset_1.4.zip». Encontrará el juego de datos en el medio de instalación de SICAT Suite.
3. Abra el juego de datos de referencia «Patient Axx» en SICAT Endo.


ENDOLINE

1. Asegúrese de que el odontograma **FDI** esté activo. Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 184 - SIDEXIS XG*].
2. Asegúrese de que el área de trabajo **Panorámica** esté activa.
3. Restablezca las vistas a los valores estándar.
4. En el **Navegador de objetos**, abra el grupo «**Diente 45**».
5. En el **Navegador de objetos**, seleccione el elemento «15,24 mm n.º diente 45» y enfóquelo.

6. Compare la vista **Longitudinal** con la siguiente captura de pantalla:

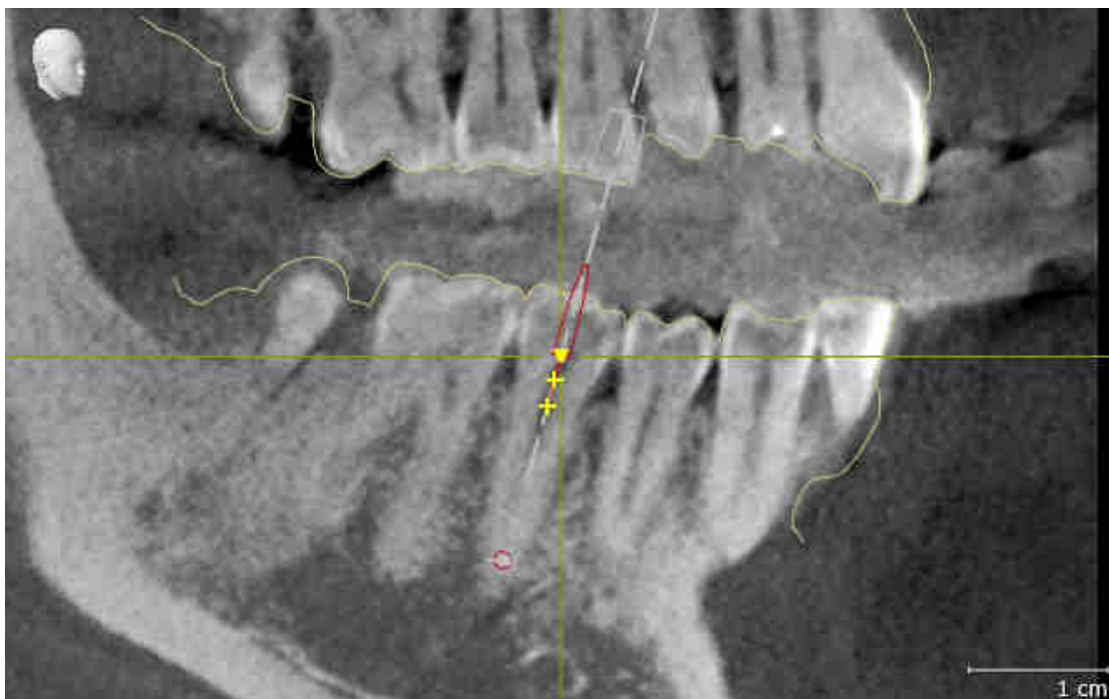

7. En el **Navegador de objetos**, abra el grupo «**Diente 25**».
8. En el **Navegador de objetos**, seleccione el elemento «13,63 mm n.º diente 25» y enfóquelo.
9. Compare la vista **Transversal** con la siguiente captura de pantalla:

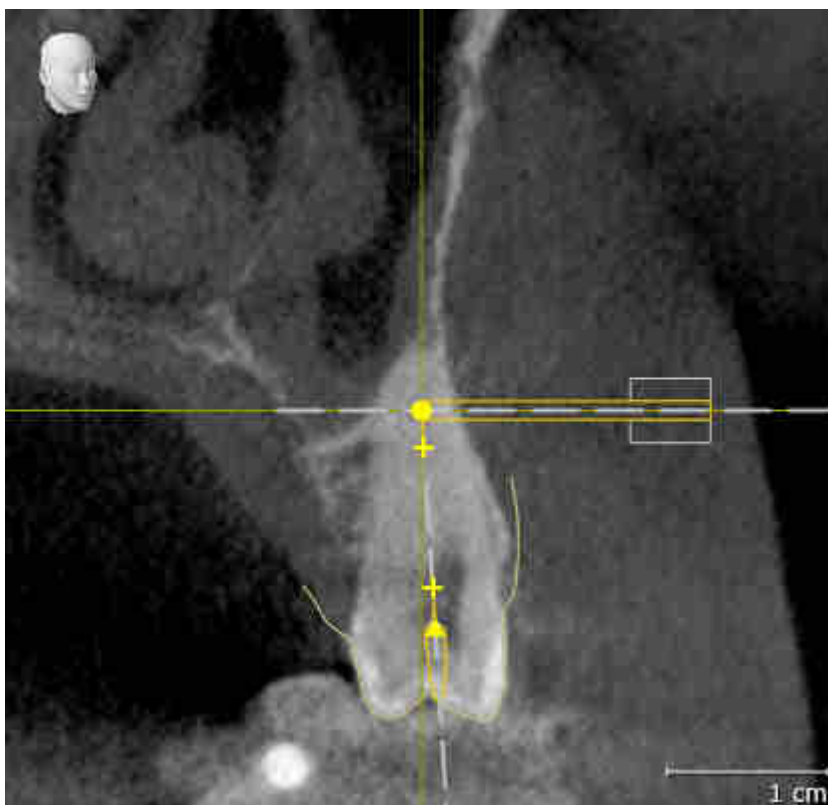

10 ACTUALIZAR O REPARAR SICAT SUITE

ACTUALIZAR SICAT SUITE

Puede actualizar SICAT Suite iniciando el programa de instalación de SICAT Suite y haciendo clic en el botón **Actualizar**. El programa de instalación desinstala primero la versión antigua de SICAT Suite. Todos los datos y los ajustes se conservan.



Una nueva versión de la versión independiente de SICAT Suite necesita archivadores de historias clínicas actualizados. Al iniciar por primera vez la nueva versión o activar un archivador de historias clínicas obsoleto, SICAT Suite pregunta al usuario si desea actualizar el archivador. Si se confirma el mensaje, SICAT Suite actualiza automáticamente el archivador de historias clínicas. **¡PRECAUCIÓN! Los archivadores de historias clínicas actualizados ya no pueden utilizarse con versiones antiguas de SICAT Suite.**



Si SIDEXIS XG se actualiza a SIDEXIS 4.1.3 o superior y después se actualiza SICAT Suite, el instalador de SICAT Suite registra SICAT Suite como módulo SIDEXIS 4. Cuando se abre una radiografía 3D, SICAT Suite comprueba si en SIDEXIS XG hay estudios sobre esa radiografía 3D y los traslada de SIDEXIS XG a SIDEXIS 4.

REPARAR SICAT SUITE

Puede reparar SICAT Suite iniciando el programa de instalación de SICAT Suite y haciendo clic en el botón **Reparar**. Todos los datos y los ajustes se conservan.

Tanto la actualización como la reparación de SICAT Suite utilizan el programa de instalación de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - SIDEXIS XG*].

11 PARTICULARIDADES DE ESTA VERSIÓN

Dependiendo de si utiliza SICAT Endo de forma independiente o conectado a otro software, existen diferencias en algunas áreas.

REGISTRO MANUAL COMO PLUGIN DE SIDEXIS XG

Además de la integración automática durante la instalación, SICAT Suite puede registrarse y eliminarse manualmente como plugin de SIDEXIS XG. Encontrará información sobre ello en *Registrar y eliminar SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG* [▶ *Página 32 - SIDEXIS XG*].

INICIO DE PROGRAMA

Como plugin de SIDEXIS XG, SICAT Suite se inicia como aplicación externa. En *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 34 - SIDEXIS XG*] encontrará información sobre cómo iniciar SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG.

DATOS DE PACIENTE Y DATOS DE VOLUMEN

La versión de SICAT Endo conectada a SIDEXIS utiliza los datos de paciente y los datos de volumen de SIDEXIS. Por ello, los datos se guardan mediante los procedimientos previstos para SIDEXIS.



Además de los datos de paciente, también deben guardarse los parámetros de usuario de las aplicaciones SICAT. Los parámetros definidos por cada usuario se encuentran en dos directorios independientes. Para abrir estos directorios, introduzca `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` y `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` en la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows.

AJUSTES

En la versión integrada en SIDEXIS, SICAT Suite solo muestra los valores de algunos ajustes, ya que los adopta de SIDEXIS.

LICENCIAS

La versión independiente y las versiones de SICAT Suite integradas en otro software utilizan las mismas licencias. No es necesario que elija una versión cuando instale SICAT Suite.

ABRIR ESTUDIOS CON Y SIN DERECHOS DE ESCRITURA



Si el PC en el que funcionan SIDEXIS XG y SICAT Suite se encuentra en un entorno de red y tanto SIDEXIS XG como la configuración de red lo permiten, SIDEXIS XG podría formar parte de una instalación de multiestación de trabajo. Entre otras consecuencias, esto puede hacer que los juegos de datos abiertos en otras estaciones de trabajo solo puedan abrirse en el modo protegido contra escritura.

Para poder realizar y guardar cambios en estudios SICAT Endo, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe estar activada una licencia completa de SICAT Endo.
- La radiografía 3D a la que pertenece el estudio SICAT Endo no está abierta en otras estaciones de trabajo.

De lo contrario, no es posible realizar y guardar cambios de estudios SICAT Endo. Si ha activado una licencia del Viewer, podrá ver radiografías 3D y estudios de SICAT Endo.

La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles en cada caso:

FUNCIÓN	LICENCIA COMPLETA ACTIVADA	LICENCIA DEL VIEWER ACTIVADA	NO HAY LICENCIA ACTIVADA
Área de servicio de asistencia	Sí	Sí	Sí
Ajustes generales	Sí	Sí	Sí
Realizar cambios	Sí	No	No
Ver datos sin guardar cambios	No	Sí	No
Ayuda	Sí	Sí	Sí

En los siguientes casos, puede ver estudios de SICAT Endo también sin licencia del Viewer:

- Exporte estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4 e importe los datos en SIDEXIS en otro PC. SICAT Endo debe estar instalado en este PC.
- Cree un paquete Wrap&Go que contenga estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4. Instale el paquete Wrap&Go en otro PC. Después, instale SICAT Endo.

En ambos casos, no podrá realizar o guardar cambios en la planificación.

En determinadas circunstancias no es posible realizar ni guardar cambios de estudios SICAT Endo aun estando activada una licencia de aplicación. La causa puede ser, por ejemplo, un proceso de pedido en curso.

Encontrará más información en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 195 - SIDEXIS XG*].

12 FLUJO DE TRABAJO ESTÁNDAR DE SICAT ENDO


PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.


PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.


PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.


PRECAUCIÓN

Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.


PRECAUCIÓN

Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.


PRECAUCIÓN

Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.



Antes de empezar a trabajar con SICAT Suite, es importante que haya leído la totalidad de las presentes instrucciones de utilización y, en especial, todas las notas sobre seguridad. Tenga las presentes las instrucciones de utilización a mano para futuras búsquedas de información.

INSTALACIÓN

Encontrará la manera de instalar SICAT Suite en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - SIDEXIS XG*].

En *Registrar y eliminar SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG* [▶ *Página 32 - SIDEXIS XG*] encontrará información sobre cómo registrar SICAT Suite manualmente como plugin de SIDEXIS XG.

HABILITAR VERSIÓN COMPLETA

- Si ha adquirido una licencia para SICAT Endo, active la licencia para habilitar la versión completa. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 39 - SIDEXIS XG*].



Si no ha adquirido ninguna licencia para SICAT Endo, abra una única radiografía 3D en el modo Viewer. Encontrará más información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 195 - SIDEXIS XG*].

AJUSTES

Modifique los ajustes deseados en el área **Ajustes**. Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 183 - SIDEXIS XG*].

JUEGOS DE DATOS

SICAT Endo Combina tres tipos de archivos diferentes entre sí.

- Radiografías 3D, por ejemplo de Sirona GALILEOS
- Radiografías intraorales, por ejemplo de Sirona XIOS XG
- impresiones ópticas digitales, por ejemplo de Sirona CEREC.

CAPTURAR JUEGOS DE DATOS

1. Elabore una radiografía intraoral del paciente en caso necesario. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.
2. Elabore una radiografía 3D del paciente. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.
3. Efectúe impresiones ópticas digitales del maxilar o de la mandíbula. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.

ABRA UN JUEGO DE DATOS

- Para trabajar con datos de SIDEXIS XG, abra en SIDEXIS XG una exploración que contenga una radiografía 3D e inicie SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 34 - SIDEXIS XG*].

TÍPICO FLUJO DE TRABAJO DE LA ENDODONCIA DIGITAL



PASOS DE TRABAJO EN SICAT ENDO

1. Si es necesario, adapte la alineación del volumen y el área panorámica. Encontrará información sobre ello en *Alineación de volumen y área panorámica* [▶ *Página 88 - SIDEXIS XG*].
2. Importe y registre las radiografías intraorales existentes en SICAT Endo. Encontrará información al respecto en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 111 - SIDEXIS XG*] y *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 117 - SIDEXIS XG*].
3. Importe y registre las impresiones ópticas con los datos de la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 99 - SIDEXIS XG*].
4. Coloque EndoLines y planifique canales de perforación. Encontrará información al respecto en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 134 - SIDEXIS XG*], *Colocar EndoLines* [▶ *Página 136 - SIDEXIS XG*] y *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 145 - SIDEXIS XG*].

5. Evalúe los objetos planificados Endo en el área de trabajo **Radiografía intraoral**. Encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral* [▶ *Página 63 - SIDEXIS XG*].
6. Cree un impreso e informe al paciente. Encontrará información sobre ello en *Informar al paciente* [▶ *Página 157 - SIDEXIS XG*].
7. Solicite una plantilla de perforación SICAT GUIDE (ENDO). Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 168 - SIDEXIS XG*].
8. Exporte datos, por ejemplo, para pedir una segunda opinión. Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 165 - SIDEXIS XG*].

TERMINAR O INTERRUMPIR EL TRABAJO CON EL JUEGO DE DATOS

- Para terminar o interrumpir su trabajo, guárdelo cerrando SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Cerrar SICAT Suite* [▶ *Página 198 - SIDEXIS XG*].

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA

Las instrucciones de utilización se encuentran en la ventana **Ayuda SICAT Suite**. Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 38 - SIDEXIS XG*].

Encontrará más temas de ayuda en el área **Servicio de asistencia**. Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 191 - SIDEXIS XG*].

13 REGISTRAR Y ELIMINAR SICAT SUITE COMO PLUGIN DE SIDEXIS XG



Si se instala SICAT Suite después de SIDEXIS XG y se ha activado la correspondiente casilla de comprobación, el programa de instalación de SICAT Suite registra el software automáticamente como plugin. Encontrará más información al respecto en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - SIDEXIS XG*].

ABRIR LA VENTANA "NGPLUGINMANAGER"

1. Pulse la tecla **Windows**, introduzca **SIDEXIS Manager** y haga clic en el símbolo **SIDEXIS Manager**.
▶ Se abre la ventana **SIDEXIS Manager**.
2. En la ventana **SIDEXIS Manager**, haga clic en el símbolo **NGPluginManager**.
3. Si es necesario, confirme el mensaje de control de las cuentas de usuario de Windows.
▶ Se abre la ventana **Plug-in manager**.

REGISTRAR SICAT SUITE

- SICAT Suite ya se ha instalado correctamente. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - SIDEXIS XG*].
 - La ventana **Plug-in manager** ya está abierta.
1. Haga clic en el botón **Add**.
▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
 2. Vaya al directorio de instalación de SICAT Suite, por ejemplo C:\Program Files\SICAT\SICAT Suite.
 3. Seleccione el archivo *Sicat.PlanAndTreat.XG.exe*.
 4. Haga clic en el botón **Abrir**.
▶ SICAT Suite está registrado como plugin de SIDEXIS.

COLOCAR EL SÍMBOLO DE SICAT SUITE

1. En el menú **Vista**, haga clic en la opción **Einstellen**.
▶ Se abre la ventana **Einstellen** con la pestaña **Befehle**.
2. Dentro de **Kategorien**, haga clic en la opción **Program Plugins**.
3. Arrastre el símbolo **SICAT Suite** desde la ventana **Einstellen** a la posición que desee en las barras de símbolos de SIDEXIS XG.

ELIMINAR SICAT SUITE

- SICAT Suite ya está registrado como plugin de SIDEXIS.
- La ventana **Plug-in manager** ya está abierta.


1. Seleccione la opción **SICAT Suite**.

2. Haga clic en el botón **Remove**.

3. Reinicie SIDEXIS.

▶ SICAT Suite ya no está disponible como plugin de SIDEXIS.


14 INICIAR SICAT SUITE

 **PRECAUCIÓN** **Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.**

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.

 **PRECAUCIÓN** **Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.

 **PRECAUCIÓN** **Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.


Para iniciar SICAT Endo, en primer lugar debe iniciar SICAT Suite.


Para iniciar SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG, haga lo siguiente:

- SICAT Suite ya se ha instalado correctamente. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - SIDEXIS XG*].
- SICAT Suite ya está registrado como plugin de SIDEXIS XG. Encontrará información sobre ello en *Registrar y eliminar SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG* [▶ *Página 32 - SIDEXIS XG*]. Si SICAT Suite se instala después de SIDEXIS XG, el registro puede llevarse a cabo automáticamente.
- Ya se ha colocado el botón de SICAT Suite en SIDEXIS XG.
- Ya ha abierto una radiografía 3D en SIDEXIS XG.

- Haga clic en el botón **SICAT Suite**.


▶ SICAT Suite abre el juego de datos en una aplicación SICAT.

 Si se abre una radiografía 3D sin estudio correspondiente y solamente se ha activado la licencia de una aplicación SICAT, se inicia dicha aplicación SICAT. Si se abre una radiografía 3D con varios estudios correspondientes y se han activado las licencias de varias aplicaciones SICAT, se inicia la aplicación cuyo estudio se haya modificado en último lugar.

 En los siguientes dos casos el juego de datos solo se abre en el modo Viewer: no hay ninguna licencia activada u otra estación de trabajo de SIDEXIS XG utiliza el juego de datos. Encontrará más información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 195 - SIDEXIS XG*].

15 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT SUITE

La interfaz de usuario de SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

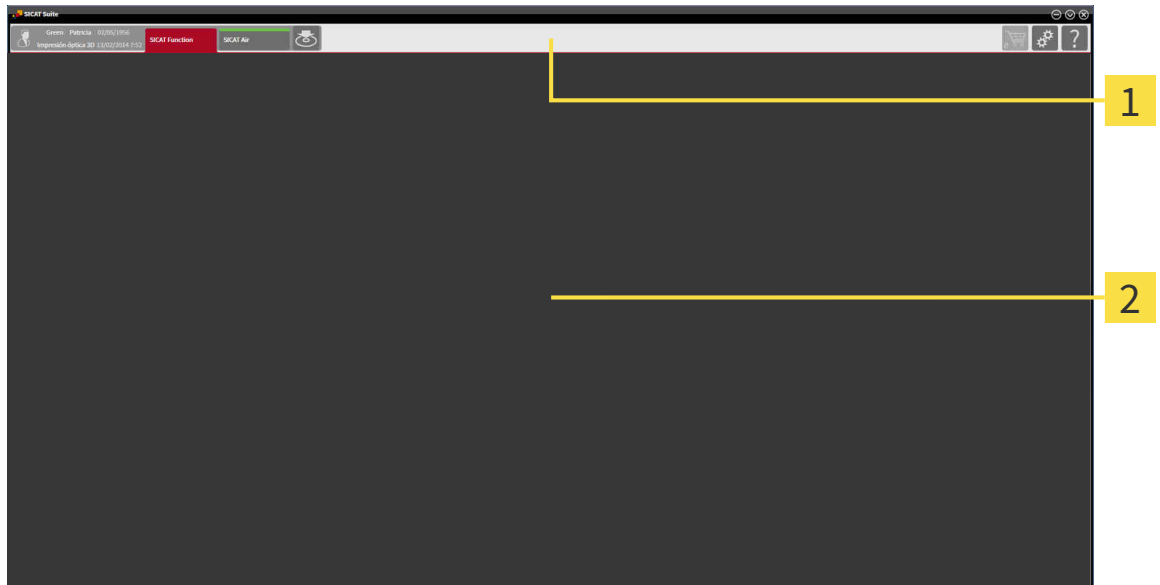

1 Barra de exploración

2 Área de aplicaciones

- La barra de exploración situada en el extremo superior de SICAT Suite muestra pestañas que permiten cambiar entre diferentes ventanas y aplicaciones.
- El **Área de aplicaciones** que se encuentra en la parte restante de SICAT Suite muestra la interfaz de usuario de la aplicación SICAT activa.

La **Barra de exploración** se compone de dos áreas distintas. El área de la parte izquierda y el área de la parte derecha siempre son visibles.

El área situada en la parte izquierda contiene las siguientes pestañas:



- Datos de paciente y datos de volumen: atributos de los datos de paciente y datos de volumen activos en función de los ajustes en SIDEXIS XG.
- **Aplicaciones** - Botones para cambiar entre las diferentes aplicaciones SICAT. Encontrará información sobre ello en *Cambiar entre aplicaciones SICAT* [▶ *Página 37 - SIDEXIS XG*].



- **Transferir datos** - Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 165 - SIDEXIS XG*].

El área situada en la parte derecha contiene las siguientes pestañas:



- **Cesta de la compra** - Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 168 - SIDEXIS XG*].



- **Ajustes** - Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 183 - SIDEXIS XG*].



- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 191 - SIDEXIS XG*].

16 CAMBIAR ENTRE APLICACIONES SICAT

Para cambiar entre distintas aplicaciones de SICAT, haga lo siguiente:



- En la **Barra de exploración**, haga clic en el botón que tenga el nombre de la aplicación SICAT deseada.
- ▶ SICAT Suite cambia a la aplicación seleccionada.


17 ABRIR LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Las instrucciones de utilización de las aplicaciones SICAT están integradas en la ventana **Servicio de asistencia** en forma de archivos PDF.



Puede abrir la ventana **Servicio de asistencia** haciendo clic en el icono **Servicio de asistencia** de la **Barra de exploración** o pulsando la tecla F1.

La ventana **Servicio de asistencia** tiene el siguiente aspecto:

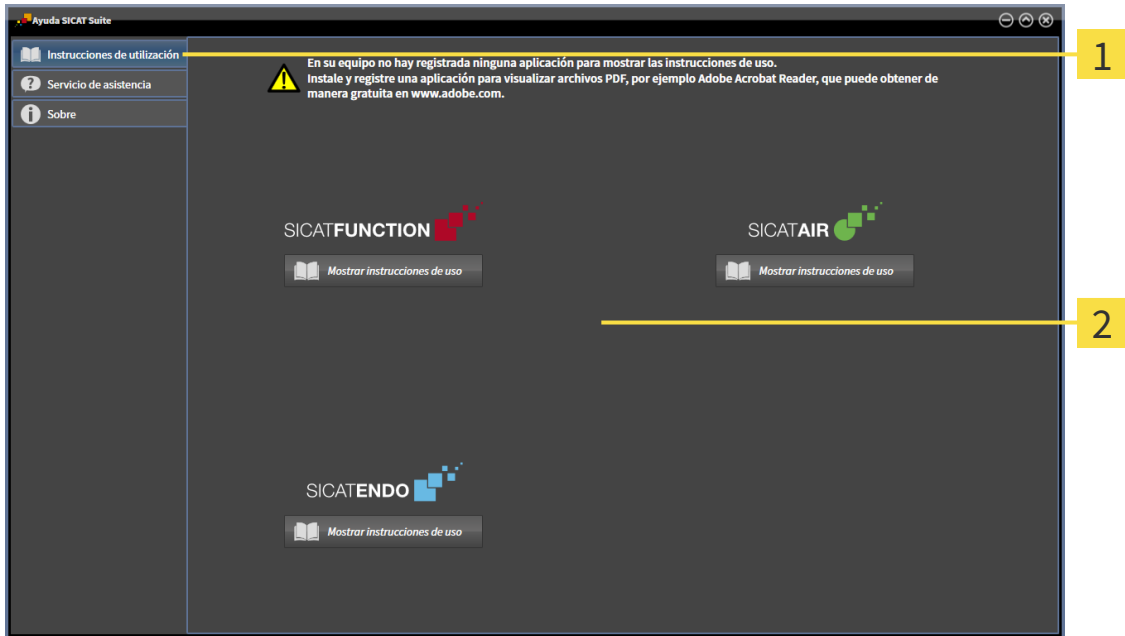

1 Pestaña **Instrucciones de utilización**

2 Ventana **Instrucciones de utilización**

Puede abrir la ayuda deseada haciendo clic en el botón **Mostrar instrucciones de utilización**.

18 LICENCIAS

SICAT Suite muestra únicamente las aplicaciones de SICAT para las que ha activado una licencia.



En la versión de SICAT Suite conectada a SIDEXIS, puede ver planificaciones de SICAT Endo también sin una licencia de SICAT Endo activada.

Existen las siguientes clases de licencias:

- Una licencia del Viewer, con la que se puede utilizar una aplicación durante un tiempo ilimitado en el modo Viewer.
- Una licencia de demostración, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo limitado.
- Una licencia completa, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo ilimitado.

Para activar una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en PC en los que esté instalado SICAT Suite.

Para activar y desactivar licencias, se aplica lo siguiente:

- Se reciben únicamente claves de licencias de aplicaciones de SICAT autorizadas en su país.
- Si activa una clave de activación en un PC, se conectará al PC una licencia de las aplicaciones de SICAT o funciones contenidas. Las licencias no están disponibles para la activación en otro PC.
- Puede desactivar las licencias de forma independiente para cada aplicación de SICAT o función determinada. Las licencias devueltas están disponibles para una nueva activación en el mismo PC o en otros.
- Si devuelve la licencia completa de una aplicación SICAT, recibirá automáticamente una licencia del Viewer, siempre y cuando la aplicación esté autorizada en su país.
- Si activa una licencia completa, recibirá automáticamente licencias del Viewer para todas las aplicaciones autorizadas en su país.

Podrá saber cómo convertir un código canjeable en una clave de activación en *Canjear códigos* [► *Página 47 - SIDEXIS XG*].

La ventana **Vista general de sus licencias** muestra una vista general de las licencias que están activadas en su PC. En las licencias de demostración, SICAT Suite muestra la fecha de caducidad de las licencias. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 41 - SIDEXIS XG*].

Puede activar licencias de dos maneras:

- Si el PC en el que funciona SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, la activación de licencia puede realizarse automáticamente. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [► *Página 42 - SIDEXIS XG*].
- Si se desea o si el PC en el que funciona SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet, puede realizar manualmente la activación de licencia utilizando archivos de solicitud de licencia. Debe cargar dichos archivos de solicitud de licencia a la página web de SICAT. A cambio, recibirá un archivo de activación de licencias que deberá activar en SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [► *Página 44 - SIDEXIS XG*].

Puede desactivar individualmente licencias para cada aplicación o función. Tras desactivar una licencia, puede introducir la misma clave de activación u otra. Las licencias devueltas están disponibles para la activación en el mismo PC o en otros. Encontrará información sobre ello en *Devolver licencias al pool de licencias* [► *Página 46 - SIDEXIS XG*].


18.1 ABRIR LA VENTANA "VISTA GENERAL DE SUS LICENCIAS"



1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Licencias**.
▶ Se abre la ventana **Vista general de sus licencias**:

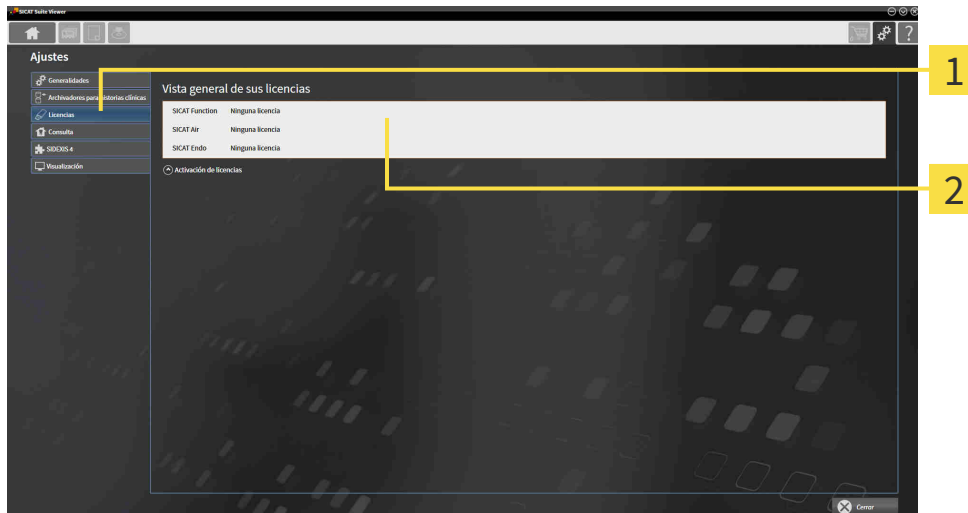

1 Pestaña **Licencias**

2 Ventana **Vista general de sus licencias**

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 42 - SIDEXIS XG*]
- *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 44 - SIDEXIS XG*]
- *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 46 - SIDEXIS XG*]

18.2 ACTIVAR LICENCIAS MEDIANTE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA

La cesta de la compra debe estar vacía


La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para iniciar el proceso de activación, haga lo siguiente:

- ☑ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia activada.
- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 41 - SIDEXIS XG*].

1. Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en el botón **Activación de licencias**.

► Se abre el área **Vista general de sus licencias**:

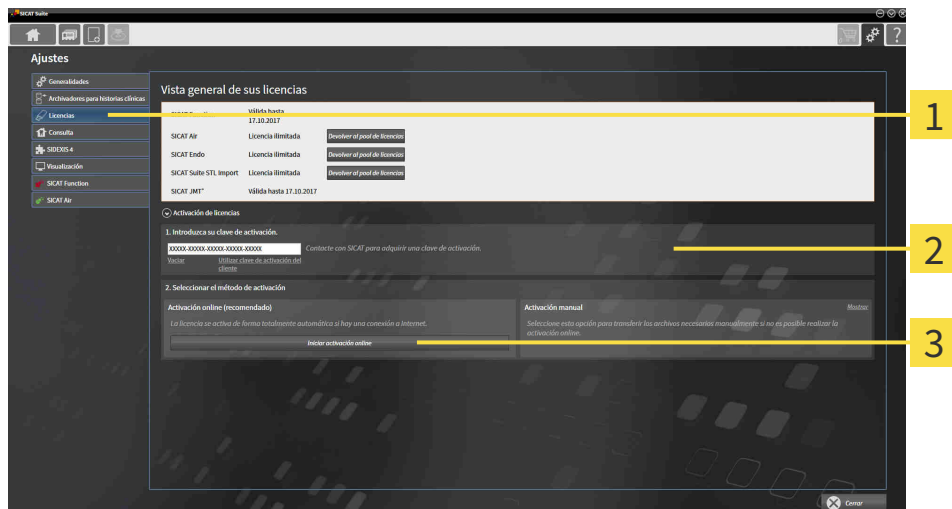

1 Botón **Activación de licencias**

2 Área **Introduzca su clave de activación**

3 Botón **Iniciar activación online**

2. Introduzca su clave de activación en el campo **Introduzca su clave de activación**.
 3. Haga clic en el botón **Iniciar activación online**.
 4. Si se abre una ventana **Cortafuegos de Windows**, permita a SICAT Suite acceder a Internet.
- Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias y se activan en SICAT Suite en el PC actual.
 - La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente**.

NOTA**Es necesario efectuar un reinicio**

Si la versión de una aplicación de SICAT conectada a SIDEXIS requiere que se reinicie después de modificar una licencia, SICAT Suite abre una ventana de notificación al respecto.



Para volver a activar una aplicación de SICAT, puede usar su clave de activación haciendo clic en el botón **Utilizar clave de activación del cliente** en el área **Introduzca su clave de activación**. Para vaciar el campo con la clave de licencia actual, puede hacer clic en el botón **Vaciar**.


18.3 ACTIVAR LICENCIAS MANUALMENTE O SIN CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA **La cesta de la compra debe estar vacía**
 La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para activar licencias manualmente o sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:

- ☑ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia activada.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [▶ *Página 41 - SIDEXIS XG*].

1. En la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en **Activación de licencias**.
 ▶ Se abre el área **Activación de licencias**.
2. En el área **Activación manual**, haga clic en **Mostrar**.
 ▶ Se abre el área **Activación manual**:

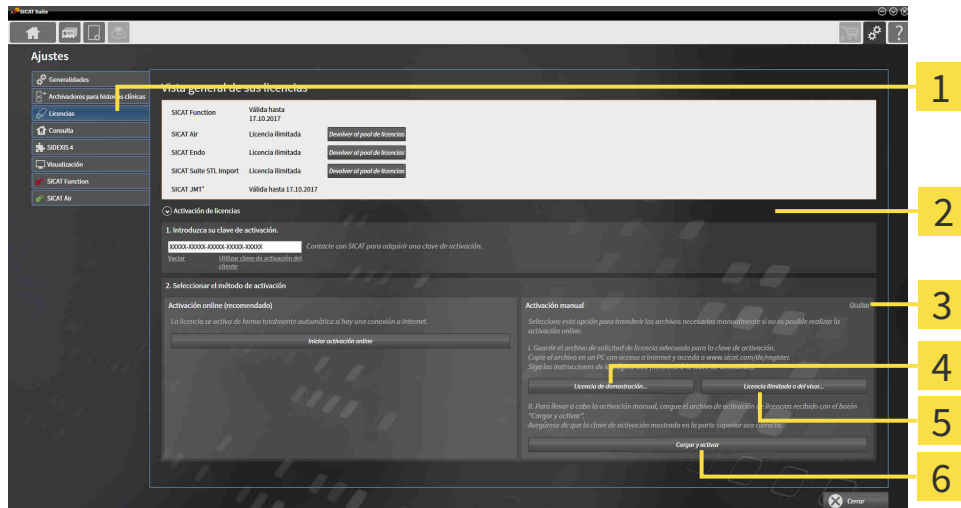

- | | |
|--|---|
| 1 Activación de licencias | 4 Botón Licencia de demostración |
| 2 Área Introduzca su clave de activación | 5 Botón Licencia completa o del visor |
| 3 Mostrar | 6 Botón Cargar y activar |

3. Si desea activar una licencia completa, haga clic en el botón **Licencia completa o del visor**.
4. Si desea activar una licencia de demostración, haga clic en el botón **Licencia de demostración**.
 ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
5. Seleccione la carpeta deseada para el archivo de solicitud de licencia y haga clic en **OK**.
 ▶ Se genera un archivo de solicitud de licencia con la extensión de archivo **WibuCmRaC** y se guarda en la carpeta seleccionada.
6. Copie el archivo de solicitud de licencia en un PC con una conexión activa a Internet, por ejemplo, con la ayuda de una memoria extraíble USB.

7. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
8. Siga las instrucciones de la página web de activación.
 - ▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias.
 - ▶ El servidor de licencias de SICAT genera un archivo de activación de licencias con la extensión de archivo **WibuCmRaU** que debe descargar a su PC.
9. Copie de nuevo el archivo de activación de licencias descargado en el PC en el que se ejecuta SICAT Suite.
10. Compruebe si está la clave correcta en el campo **Introduzca su clave de activación**.
11. Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en el botón **Cargar y activar**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
12. Navegue hasta el archivo de activación de licencias, selecciónelo y haga clic en **OK**.
 - ▶ La licencia del archivo de activación de licencias se instala en SICAT Suite en el PC actual.
 - ▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente**.

NOTA**Es necesario efectuar un reinicio**

Si la versión de una aplicación de SICAT conectada a SIDEXIS requiere que se reinicie después de modificar una licencia, SICAT Suite abre una ventana de notificación al respecto.

18.4 DEVOLVER LICENCIAS AL POOL DE LICENCIAS


NOTA

La cesta de la compra debe estar vacía

La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para desactivar una licencia completa y devolverla al pool de licencias, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha activado la licencia completa de una aplicación SICAT.
- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 41 - SIDEXIS XG*].

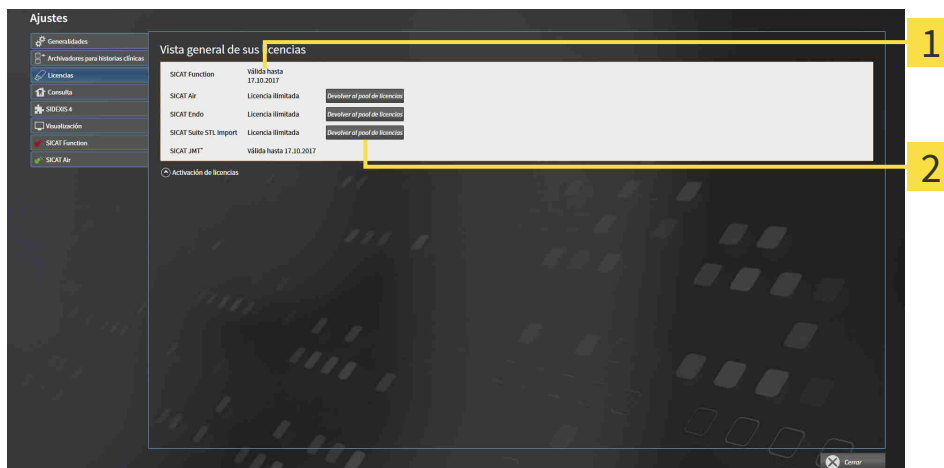

1 Estado de licencia de las aplicaciones SICAT y de funciones concretas

2 Botón **Devolver al pool de licencias**

- Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, en la fila de la aplicación SICAT deseada o de una función concreta, haga clic en el botón **Devolver al pool de licencias**.
- La licencia seleccionada se devuelve al pool de licencias y vuelve a estar disponible para la activación.
- La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha devuelto correctamente al pool de licencias**.
- Sin una licencia, una aplicación solo está disponible en el modo Viewer. Si se han devuelto las licencias de todas las aplicaciones SICAT al pool de licencias, SICAT Suite cambia completamente al modo Viewer.

NOTA

Es necesario efectuar un reinicio

Si la versión de una aplicación de SICAT conectada a SIDEXIS requiere que se reinicie después de modificar una licencia, SICAT Suite abre una ventana de notificación al respecto.



Si desea desactivar una licencia en un PC sin tener conexión activa a Internet, póngase en contacto con la asistencia SICAT.

18.5 CANJEAR CÓDIGOS

1. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
2. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - ▶ Se abrirá el portal SICAT.
3. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
4. En la administración de cuentas, haga clic en la entrada para administrar sus licencias.
5. Introduzca su código canjeable y confírmelo.
 - ▶ El portal SICAT genera una clave de licencia y añade la clave de licencia a su clave de activación.
6. Inicie SICAT Suite y active la licencia.


Encontrará información al respecto en *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 42 - SIDEXIS XG*] y *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 44 - SIDEXIS XG*].



Encontrará más ayuda en la sección de preguntas más frecuentes (FAQ) del portal SICAT.

19 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT ENDO

La interfaz de usuario de SICAT Endo consta de las siguientes secciones:

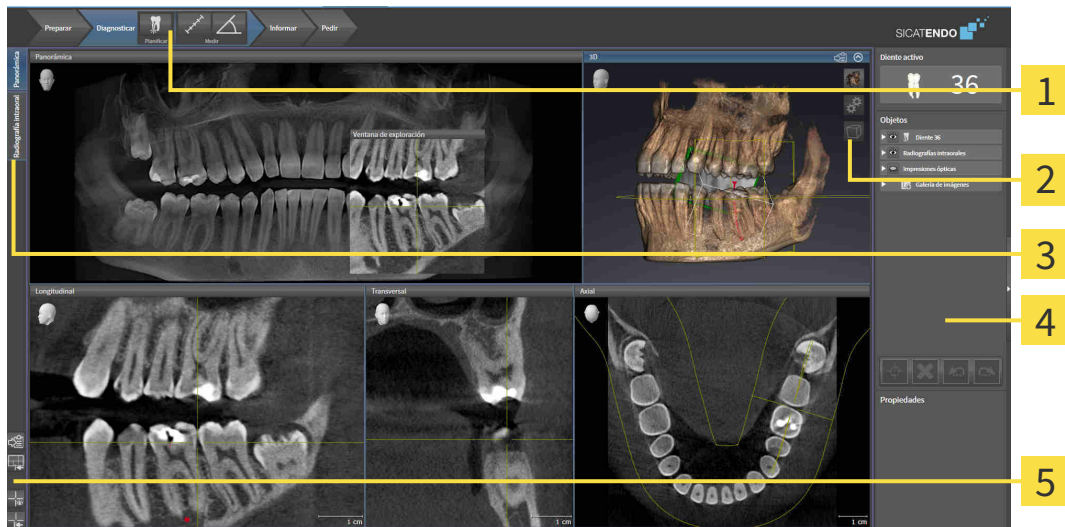

- 1** Barra de herramientas del flujo de trabajo
- 2** Barra de herramientas de la vista
- 3** Botones para cambiar de área de trabajo
- 4** Barra de objetos
- 5** Barra de herramientas del área de trabajo

- La **Barra de herramientas del flujo de trabajo** consta de distintos pasos de flujo de trabajo que contienen las herramientas principales del flujo de trabajo de la aplicación. Esto incluye herramientas con las que se pueden añadir e importar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► [Página 49 - SIDEXIS XG](#)].
- La **Región del área de trabajo** es la parte de la interfaz de usuario situada debajo de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Muestra el área de trabajo activa de SICAT Endo. Cada área de trabajo contiene una combinación determinada de vistas. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [► [Página 60 - SIDEXIS XG](#)].
- La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista**. Contiene herramientas para ajustar la visualización de la vista respectiva. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [► [Página 68 - SIDEXIS XG](#)] y *Adaptar la vista 3D* [► [Página 82 - SIDEXIS XG](#)].
- La **Barra de objetos** contiene herramientas para administrar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información al respecto en *Barra de objetos* [► [Página 52 - SIDEXIS XG](#)] y *Objetos de SICAT Endo* [► [Página 56 - SIDEXIS XG](#)].
- La **Barra de herramientas del área de trabajo** contiene herramientas para modificar ajustes generales de áreas de trabajo y todas las vistas contenidas y para documentar el contenido de áreas de trabajo. Encontrará información al respecto en *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [► [Página 77 - SIDEXIS XG](#)], *Restablecer vistas* [► [Página 80 - SIDEXIS XG](#)], *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [► [Página 65 - SIDEXIS XG](#)] y *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [► [Página 66 - SIDEXIS XG](#)].

19.1 BARRA DE HERRAMIENTAS DEL FLUJO DE TRABAJO


En SICAT Endo, la **Barra de herramientas del flujo de trabajo** se compone de cuatro pasos de flujo de trabajo:

1. **Preparar**
2. **Diagnosticar**
3. **Informar**
4. **Pedir**

CONTRAER Y EXPANDIR PASOS DE FLUJO DE TRABAJO

Puede contraer y expandir los pasos de flujo de trabajo haciendo clic en ellos.

1. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «PREPARAR»

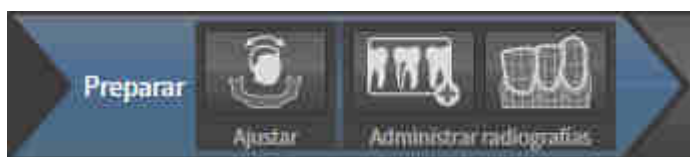

En el paso de flujo de trabajo **Preparar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** - Encontrará información al respecto en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ [Página 90 - SIDEXIS XG](#)] y *Ajustar el área panorámica* [▶ [Página 95 - SIDEXIS XG](#)].



- **Administrando y registrando radiografías intraorales** Encontrará información al respecto en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ [Página 111 - SIDEXIS XG](#)], *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ [Página 115 - SIDEXIS XG](#)] y *Registrar la radiografía intraoral* [▶ [Página 117 - SIDEXIS XG](#)].



- **Importar y registrar impresiones ópticas** - Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ [Página 99 - SIDEXIS XG](#)].

2. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «DIAGNOSTICAR»



En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Planificando el tratamiento de la raíz con ayuda de EndoLines y canales de perforación** Encontrará información al respecto en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 134 - SIDEXIS XG*], *Colocar EndoLines* [▶ *Página 136 - SIDEXIS XG*] y *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 145 - SIDEXIS XG*].



- **Añadir medición de distancias (D)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 152 - SIDEXIS XG*].



- **Añadir medición de ángulo (A)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 153 - SIDEXIS XG*].

3. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «INFORMAR»



En el paso de flujo de trabajo **Informar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Dibujar flecha** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 158 - SIDEXIS XG*].



- **Dibujar círculo** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 158 - SIDEXIS XG*].



- **Creando informe** - Encontrará información sobre ello en *Preparar impresos* [▶ *Página 162 - SIDEXIS XG*].

4. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «PEDIR»




En el paso de flujo de trabajo **Pedir** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)** - Encontrará información sobre ello en *Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra* [▶ *Página 169 - SIDEXIS XG*].

19.2 BARRA DE OBJETOS

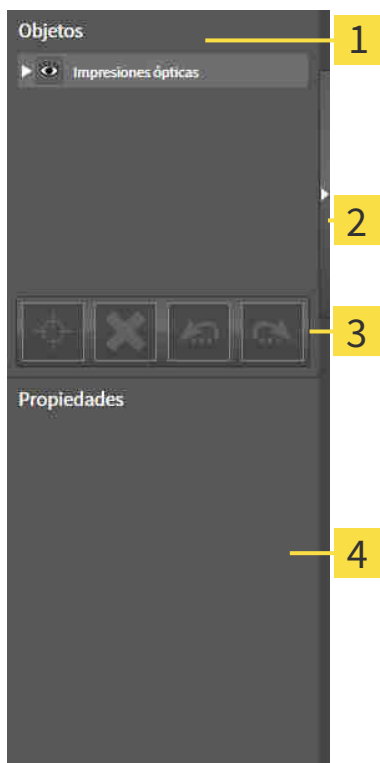

1 Navegador de objetos

2 Botón **Ocultar la barra de objetos** o botón **Mostrar la barra de objetos**

3 Barra de herramientas del objeto

4 Área **Propiedades**

La **Barra de objetos** contiene los siguientes elementos:

- El **Navegador de objetos** muestra una lista categorizada de todos los objetos de diagnóstico y los objetos planificados que ha añadido al estudio actual o que ha importado sobre este estudio. El **Navegador de objetos** agrupa objetos automáticamente. Por ejemplo, el grupo **Mediciones** contiene todos los objetos de medición. Puede contraer o expandir grupos de objetos, activar objetos y grupos de objetos y mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [► *Página 53 - SIDEXIS XG*].
- La **Barra de herramientas del objeto** contiene herramientas para enfocar objetos, eliminar objetos o grupos de objetos y deshacer o rehacer acciones de objetos o de grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [► *Página 55 - SIDEXIS XG*].
- El área **Propiedades** muestra los detalles del objeto activo.

Puede modificar la visibilidad de la **Barra de objetos** con dos botones en el lado derecho de la **Barra de objetos**: **Ocultar la barra de objetos** y **Mostrar la barra de objetos**

Los objetos que están disponibles en SICAT Endo se encuentran en *Objetos de SICAT Endo* [► *Página 56 - SIDEXIS XG*].

19.3 GESTIONAR OBJETOS CON EL NAVEGADOR DE OBJETOS

CONTRAER Y EXPANDIR GRUPOS DE OBJETOS

Para contraer y expandir un grupo de objetos, haga lo siguiente:



El grupo de objetos deseado está expandido actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Contraer** situado junto al grupo de objetos deseado.
 - ▶ El grupo de objetos se contrae.



2. Haga clic en el símbolo **Expandir** situado junto al grupo de objetos deseado.
 - ▶ El grupo de objetos se expande.

ACTIVAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Algunas herramientas solo están disponibles para objetos o grupos de objetos activos.

Para activar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

El objeto o el grupo de objetos deseado está desactivado actualmente.

- Haga clic en el objeto o grupo de objetos deseado.
 - ▶ SICAT Endo desactiva un objeto o grupo de objetos previamente activado.
 - ▶ SICAT Endo activa el objeto o grupo de objetos deseado.
 - ▶ SICAT Endo destaca en color el objeto o grupo de objetos en el **Navegador de objetos** y en las vistas.



En las vistas 2D también es posible activar determinados objetos haciendo clic en ellos.

MOSTRAR Y OCULTAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS



Esta función solo está disponible para determinados tipos de objetos.

Para mostrar y ocultar un objeto o grupo de objetos, haga lo siguiente:

- El objeto o grupo de objetos deseado se muestra actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Mostrado** o en el símbolo **Algunos mostrados** junto al objeto o grupo de objetos deseado.



- ▶ SICAT Endo oculta el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Endo muestra el símbolo **Oculto** junto al objeto o grupo de objetos.



2. Haga clic en el símbolo **Oculto** situado junto al objeto o grupo de objetos deseado.

- ▶ SICAT Endo muestra el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Endo muestra el símbolo **Mostrado** junto al objeto o grupo de objetos.

19.4 GESTIONAR OBJETOS CON LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL OBJETO



Estas funciones solo están disponibles para determinados tipos de objetos.

ENFOCAR OBJETOS

Utilice esta función para buscar objetos en vistas.

Para enfocar un objeto, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*].



- Haga clic en el símbolo **Enfocar objeto activo (F)**.
- ▶ SICAT Endo desplaza el punto de enfoque de las vistas al objeto activo.
- ▶ SICAT Endo muestra el objeto activo en las vistas.



También puede enfocar objetos haciendo doble clic en ellos en el **Navegador de objetos** o en una vista que no sea la vista **3D**.

ELIMINAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Para eliminar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto o grupo de objetos deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*].



- Haga clic en el símbolo **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)**.
- ▶ SICAT Endo elimina el objeto o grupo de objetos.

DESHACER Y REHACER ACCIONES DE OBJETOS

Para deshacer y rehacer la última acción de objeto o de grupo, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)**.
 - ▶ SICAT Endo deshace la última acción de objeto o de grupo.



2. Haga clic en el símbolo **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)**.
 - ▶ SICAT Endo rehace la última acción de objeto o de grupo deshecha.



Las opciones de deshacer y rehacer solamente están disponibles mientras está abierto un estudio en una aplicación SICAT.

19.5 OBJETOS DE SICAT ENDO

En **Navegador de objetos**, SICAT Endo agrupa grupos de objetos y objetos específicos de la aplicación de la siguiente manera:

- **Radiografías intraorales**
- **Impresiones ópticas**
- **Objeto planificado Endo**
 - **EndoLine**
 - **Canal de perforación**
- **Galería de imágenes**
 - **Imagen**
 - **Imagen de pantalla**

GRUPO DE OBJETOS DE LAS RADIOGRAFÍAS INTRAORALES



Después de importar y registrar las radiografías intraorales, SICAT Endo muestra un grupo de objetos **Radiografías intraorales** en el **Navegador de objetos**. Un grupo de objetos **Radiografías intraorales** contiene siempre como mínimo una radiografía intraoral. SICAT Endo muestra la fecha y la hora de adquisición para cada radiografía intraoral.

GRUPO DE OBJETOS DE IMPRESIONES ÓPTICAS



Después de importar y registrar al menos una impresión óptica, SICAT Endo muestra un grupo de objetos **Impresiones ópticas** en el **Navegador de objetos**. Un grupo de objetos **Impresiones ópticas** puede contener los siguientes objetos:

- **Maxilar**
- **Mandíbula**

Si se enfoca un objeto, SICAT Endo enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

Si se elimina un objeto **Maxilar** o un objeto **Mandíbula**, SICAT Endo elimina todas las impresiones ópticas del estudio.

GRUPO DE OBJETOS PLANIFICADOS ENDO



Después de haber planificado EndoLines y canales de perforación, SICAT Endo **muestra grupos de objetos planificados Endo** en el **Navegador de objetos**. Un **grupo de objetos planificados Endo** siempre está vinculado a los dientes y contiene los resultados del asistente de EndoLine en forma de EndoLines y canales de perforación. Un **grupo de objetos planificados Endo** contiene EndoLines como objetos y canales de perforación como subobjetos. Los canales de perforación están siempre enlazados a un EndoLine. Con ayuda de los canales de perforación, podrá planificar su tratamiento de endodoncia.

Si se enfoca uno de los objetos o subobjetos, SICAT Endo enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

GRUPO DE OBJETOS DE LA GALERÍA DE IMÁGENES



Para el grupo de objetos **Galería de imágenes** se aplica lo siguiente:



- Si sitúa el puntero del ratón sobre un grupo de objetos **Galería de imágenes**, SICAT Endo muestra un símbolo de una rueda dentada. Al hacer clic en ese símbolo, SICAT Endo abre la ventana **Creación del informe**.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un grupo de objetos **Galería de imágenes**. SICAT Endo elimina todos los objetos de **Imagen** correspondientes y los objetos **Imagen de pantalla**.

OBJETOS DE IMÁGENES



Para los objetos **Imagen** se aplica lo siguiente:

- **Imagen** Los objetos están debajo de los grupos de objetos **Galería de imágenes**.
- SICAT Endo Para cada vista 2D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de un corte y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- SICAT Endo para la vista 3D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de una determinada posición y un determinado factor de zoom y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar las funciones **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)** y **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)** para anotaciones individuales.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen** y, con él, todas las anotaciones que contenga a la vez. SICAT Endo elimina los objetos **Imagen** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Creación del informe**.
- Si enfoca un objeto **Imagen**, SICAT Endo crea la vista correspondiente para el momento en que haya creado la última anotación contenida.

OBJETOS DE CAPTURAS DE PANTALLA



Para los objetos **Imagen de pantalla** se aplica lo siguiente:

- **Imagen de pantalla** Los objetos están debajo de los grupos de objetos **Galería de imágenes**.
- SICAT Endo crea un objeto **Imagen de pantalla** por cada captura de pantalla.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen de pantalla**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen de pantalla**. SICAT Endo elimina los objetos **Imagen de pantalla** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Creación del informe**.
- Si enfoca un objeto **Imagen de pantalla**, SICAT Endo crea la vista correspondiente para el momento en que se crea el objeto.
- Las funciones de mostrar y ocultar no están disponibles.

20 ÁREAS DE TRABAJO

Las aplicaciones SICAT representan estudios en distintas vistas y disponen combinaciones de vistas en áreas de trabajo.

En **SICAT Endo** hay dos áreas de trabajo distintas:

- Área de trabajo **panorámica**: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo panorámica* [▶ *Página 61 - SIDEXIS XG*].
- Área de trabajo de la **radiografía intraoral**: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral* [▶ *Página 63 - SIDEXIS XG*].


Las siguientes acciones están disponibles para las áreas de trabajo y las vistas contenidas:

- *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 64 - SIDEXIS XG*].
- *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [▶ *Página 65 - SIDEXIS XG*].
- *Ajustar las vistas* [▶ *Página 68 - SIDEXIS XG*].
- Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].
- Es posible documentar el contenido del área de trabajo activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [▶ *Página 66 - SIDEXIS XG*].

Panorámica

Radiografía Intraoral

20.1 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO PANORÁMICA

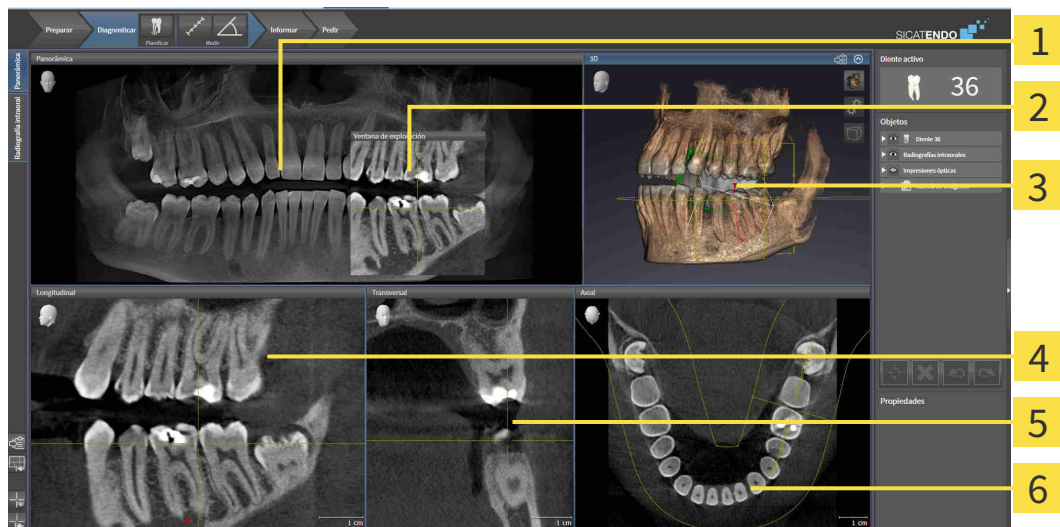

1 Panorámica Vista

2 Ventana explor

3 3D Vista

4 Longitudinal Vista

5 Transversal Vista

6 Axial Vista

VISTA PANORÁMICA

La vista **Panorámica** se corresponde con un ortopantomograma virtual (OPG). Muestra una proyección ortogonal a la curva panorámica con un grosor determinado. Puede ajustar la curva panorámica y el grosor a ambos maxilares. Encontrará más información al respecto en *Ajustar el área panorámica* [► *Página 95 - SIDEXIS XG*].

VENTANA EXPLOR.

La **Ventana explor** está incrustada en la vista **Panorámica**. Añade la tercera dimensión a la vista **Panorámica** mostrando cortes en paralelo a la curva panorámica. Puede mostrar y ocultar la **Ventana explor**. Encontrará más información al respecto en *Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración* [► *Página 78 - SIDEXIS XG*].

VISTA 3D

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

VISTA LONGITUDINAL

La vista **Longitudinal** muestra cortes tangenciales con respecto a la curva panorámica.

VISTA TRANSVERSAL


La vista **Transversal** muestra cortes ortogonales con respecto a la curva panorámica.

VISTA AXIAL

De forma predeterminada, la vista **Axial** muestra cortes desde arriba. Puede cambiar la posición de la vista **Axial**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 189 - SIDEXIS XG*].

Encontrará las funciones de las vistas en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 68 - SIDEXIS XG*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].

20.2 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

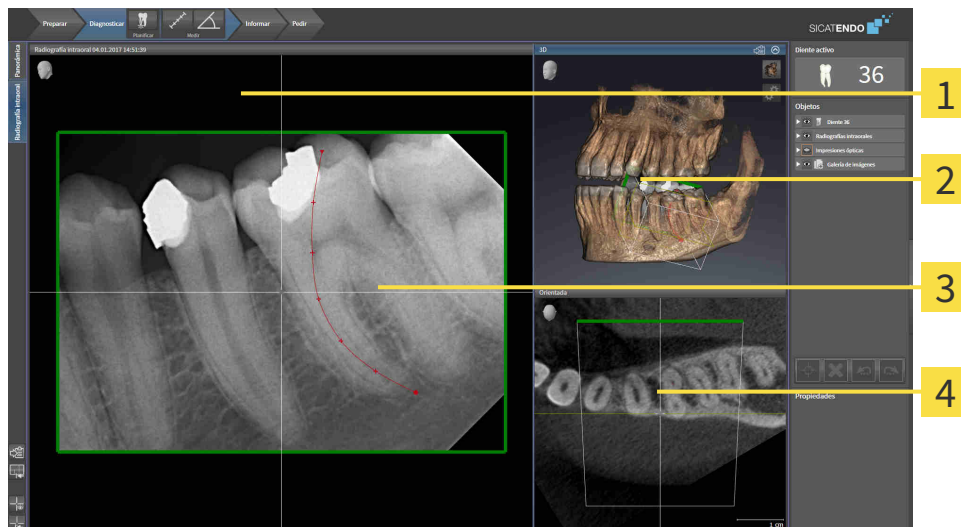

1 Radiografía intraoral Vista

2 3D Vista

3 Ventana de exploración

4 Orientada Vista

RADIOGRAFÍA INTRAORAL VISTA

La vista **Radiografía intraoral** muestra la radiografía intraoral seleccionada en el navegador de objetos.

VENTANA EXPLOR.

La **Ventana explor** está incrustada en la vista **Radiografía intraoral**. Añade la tercera dimensión a la vista **Radiografía intraoral** mostrando cortes en paralelo a la radiografía intraoral. Puede mostrar u ocultar la **Ventana explor** y utilizarla para comprobar el registro o evaluar canales de raíces.

3DVISTA

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

ORIENTADA VISTA

De forma estándar, la vista **Orientada** muestra un corte por la radiografía intraoral que se define por la posición del retículo en la vista **Radiografía intraoral**.

20.3 CAMBIAR EL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para cambiar el área de trabajo activa, haga lo siguiente:




- En la esquina superior izquierda de la región del área de trabajo, haga clic en la pestaña del área de trabajo deseada.
- ▶ Se abre el área de trabajo seleccionada.

20.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL FORMATO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

AJUSTAR EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para ajustar el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el límite entre dos o varias vistas.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma:

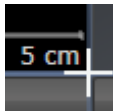

2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La posición del límite cambia.
 - ▶ Se cambian los tamaños de las vistas en todos los lados del límite.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo conserva la posición actual del límite y los tamaños actuales de las vistas en todos los lados del límite.

RESTABLECER EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para restablecer el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:



- Haga clic en el símbolo **Restablecer el formato del área de trabajo activa** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.
- ▶ SICAT Endo restablece el área de trabajo activa al formato estándar. Esto significa que el software muestra todas las vistas en sus tamaños estándar.

20.5 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE ÁREAS DE TRABAJO

A efectos de documentación, puede copiar capturas de pantalla de las áreas de trabajo en el portapapeles de Windows.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UN ÁREA DE TRABAJO EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar la captura de pantalla de un área de trabajo en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- El área de trabajo deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 64 - SIDEXIS XG*].



- En la barra de herramientas del área de trabajo, haga clic en el símbolo **Copiar captura de pantalla del área de trabajo activa en el portapapeles**.
- ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla del área de trabajo en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl +V.

21 VISTAS


Las vistas están incluidas en las áreas de trabajo. Encontrará una descripción de las distintas áreas de trabajo y vistas en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 60 - SIDEXIS XG*].

Puede ajustar las vistas. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 68 - SIDEXIS XG*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].

21.1 AJUSTAR LAS VISTAS

Algunas herramientas para ajustar las vistas solo están disponibles para la vista activa. Encontrará la manera de activar una vista en *Cambiar la vista activa* [► *Página 70 - SIDEXIS XG*].

Una vista activa contiene los siguientes elementos:

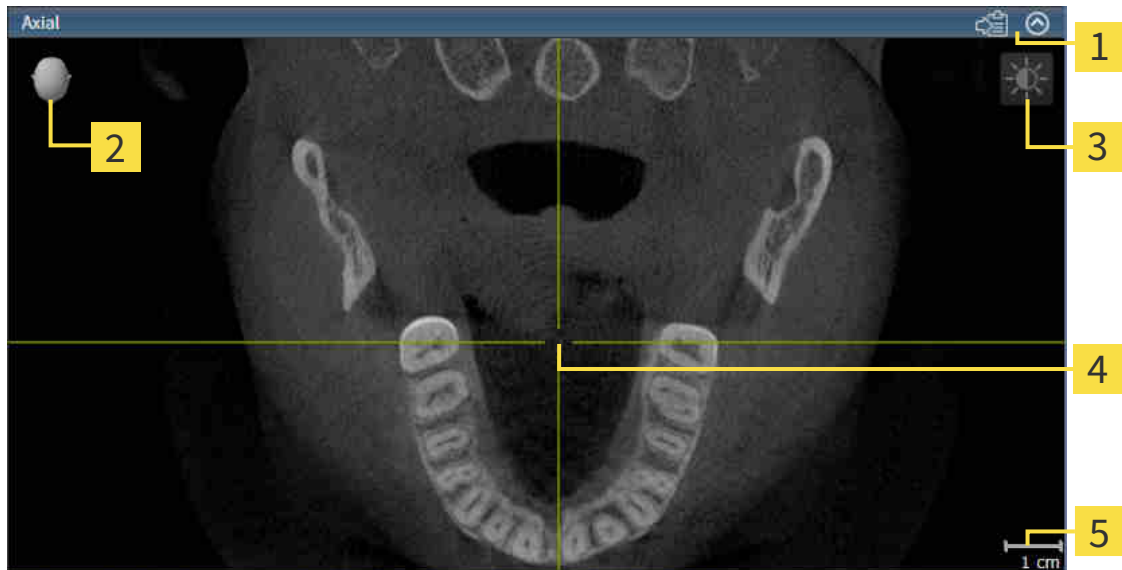

- 1** Barra de título
- 2** Cabezal de orientación
- 3** Barra de herramientas de la vista
- 4** Retículo
- 5** Escala

Las vistas de corte 2D muestran retículos. Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte. SICAT Endo sincroniza todas las vistas de corte entre sí. Esto significa que todos los retículos apuntan a la misma posición dentro de los datos radiográficos 3D. Con ello podrá asignar estructuras anatómicas más allá de las vistas.

La vista **3D** muestra los marcos que visualizan las posiciones actuales de las vistas de corte 2D.

Para ajustar las vistas están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 70 - SIDEXIS XG*]
- *Maximizar y restablecer vistas* [▶ *Página 72 - SIDEXIS XG*]
- *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 73 - SIDEXIS XG*]
- *Ampliar vistas y desplazar secciones* [▶ *Página 75 - SIDEXIS XG*]
- *Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D* [▶ *Página 76 - SIDEXIS XG*]
- *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [▶ *Página 77 - SIDEXIS XG*]
- *Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración* [▶ *Página 78 - SIDEXIS XG*]
- *Restablecer vistas* [▶ *Página 80 - SIDEXIS XG*]

Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].

Puede documentar el contenido de una vista activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de vistas* [▶ *Página 81 - SIDEXIS XG*].

21.2 CAMBIAR LA VISTA ACTIVA

La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista** y la barra de título.

Para activar una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada:



2. Haga clic en la vista que desee.

► SICAT Endo activa la vista:



La vista activa se reconoce porque la barra de título es de color naranja.

21.3 MAXIMIZAR Y RESTABLECER VISTAS

Para maximizar una vista y restablecer su tamaño anterior, haga lo siguiente:

- ☑ La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 70 - SIDEXIS XG*].
- ☑ La vista deseada no está maximizada.



1. En la barra de título de la vista deseada, haga clic en el símbolo **Maximizar**.

► SICAT Endo maximiza la vista.



2. En la barra de título de la vista maximizada, haga clic en el símbolo **Restaurar**.

► SICAT Endo restablece el tamaño anterior de la vista.



Para maximizar las vistas y restablecer su tamaño anterior, están disponibles las siguientes alternativas:

- Para maximizar una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista deseada.
- Para restablecer el tamaño anterior de una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista maximizada.

21.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL BRILLO Y EL CONTRASTE DE LAS VISTAS 2D

Para ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D, haga lo siguiente:

- ☑ La vista 2D deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 70 - SIDEXIS XG*].



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista 2D, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Ajustar brillo y contraste**.

▶ Se abre la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**:



2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Brillo**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ SICAT Endo adapta el brillo de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Brillo**.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el brillo actual de la vista 2D.



5. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Contraste**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ SICAT Endo adapta el contraste de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Contraste**.
7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el contraste actual de la vista 2D.
8. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**.
 - ▶ La ventana transparente **Ajustar brillo y contraste** se cierra.

Para restablecer el brillo y el contraste de la vista 2D a los valores estándar, puede hacer clic en el símbolo **Restablecer brillo y contraste**.



El brillo y el contraste de todas las vistas de corte 2D están adaptados entre sí.

21.5 AMPLIAR VISTAS Y DESPLAZAR SECCIONES

AMPLIAR UNA VISTA

La opción de zoom amplía o reduce el contenido de una vista.

Para aplicar el zoom en una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Gire la rueda del ratón hacia delante.
 - ▶ La vista se ampliará.
3. Gire la rueda del ratón hacia atrás.
 - ▶ La vista se reducirá.



Como alternativa, puede pulsar la rueda del ratón y mover el ratón hacia arriba o hacia abajo para reducir o ampliar la vista.

DESPLAZAR LA SECCIÓN DE UNA VISTA

Para desplazar la sección de una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón derecho del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La sección de la vista se desplaza según el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón derecho del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la sección actual de la vista.

21.6 DESPLAZARSE POR LOS CORTES DE LAS VISTAS DE CORTE 2D

Para desplazarse por los cortes de una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una flecha bidireccional.
3. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ A excepción del corte **Transversal**, los cortes se mueven de forma paralela.
 - ▶ El corte **Transversal** se mueve a lo largo de la curva panorámica.
 - ▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el corte actual.

21.7 MOVER, OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS


MOVER UN RETÍCULO

Para mover el retículo en una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.

1. En la vista que desee, sitúe el puntero del ratón en el centro del retículo.

▶ El puntero del ratón se transforma en un retículo:

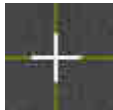

2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3. Desplace el ratón.

▶ El retículo de la vista sigue el movimiento del ratón.

▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.

▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.

4. Suelte el botón izquierdo del ratón.

▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del retículo.



Para desplazar de inmediato el retículo a la posición de puntero del ratón, también puede hacer doble clic en una vista 2D.

OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS

Para ocultar y mostrar todos los retículos y los marcos, haga lo siguiente:

Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.



1. Haga clic en el símbolo **Ocultar retículos y marcos** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.

▶ SICAT Endo oculta los retículos en todas las vistas de corte 2D.

▶ SICAT Endo oculta los marcos en la vista **3D**.



2. Haga clic en el símbolo **Mostrar retículos y marcos**.

▶ SICAT Endo muestra los retículos en todas las vistas de corte 2D.

▶ SICAT Endo muestra los marcos en la vista **3D**.

21.8 DESPLAZAR, OCULTAR Y VISUALIZAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN

DESPLAZAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN

Para desplazar la **Ventana explor**, haga lo siguiente:

- El área de trabajo **Panorámica** o el área de trabajo **Radiografía intraoral** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 64 - SIDEXIS XG*].
- La **Ventana explor** ya se muestra:



1. En la vista **Panorámica** o en la vista **Radiografía intraoral**, sitúe el puntero del ratón sobre la barra de título **Ventana explor**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una mano.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La **Ventana explor** sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la **Ventana explor**.

OCULTAR Y MOSTRAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN



El icono que indica si la **Ventana explor** se está mostrando o está oculta es a la vez indicador de estado e interruptor.

Para ocultar y mostrar la **Ventana explor**, haga lo siguiente:

- El área de trabajo **Panorámica** o el área de trabajo **Radiografía intraoral** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 64 - SIDEXIS XG*].
- La **Ventana explor** ya se muestra.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **Panorámica** o de la vista **Radiografía intraoral**, haga clic en el símbolo **Ocultar la ventana de exploración**.

▶ SICAT Endo oculta la **Ventana explor**.



2. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **Panorámica** o de la vista **Radiografía intraoral**, haga clic en el símbolo **Mostrar la ventana de exploración**.

▶ SICAT Endo muestra la **Ventana explor**.

21.9 RESTABLECER VISTAS

Para restablecer todas las vistas, haga lo siguiente:



- En la **Barra de herramientas del área de trabajo**, haga clic en el icono **Restablecer vistas**.
- ▶ SICAT Endo restablece en todas las vistas los valores estándar para el zoom, el desplazamiento de las secciones, el desplazamiento, el desplazamiento de los retículos y el desplazamiento de la **Ventana explor**.
- ▶ SICAT Endo restablece la posición de la vista **3D** al valor estándar.

21.10 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE VISTAS

A efectos de documentación, puede realizar capturas de pantalla de las vistas y enviarlas de las siguientes maneras:

- Exportar a la exploración de SIDEXIS XG actual
- Copiar en el portapapeles de Windows.

EXPORTAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UNA VISTA A LA EXPLORACIÓN DE SIDEXIS ACTUAL

Para exportar una captura de pantalla de una vista a la exploración de SIDEXIS actual, haga lo siguiente:

- La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 70 - SIDEXIS XG*].



- En la barra de título de la vista, haga clic en el símbolo **Exportar la captura de pantalla a la exploración de SIDEXIS actual**.

- ▶ SICAT Endo exporta una captura de pantalla de la vista a la exploración de SIDEXIS actual.

Si abre una captura de pantalla que haya creado en una aplicación SICAT desde SIDEXIS XG, la aplicación SICAT se iniciará con el estudio correspondiente.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UNA VISTA EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar una captura de pantalla de una vista en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 70 - SIDEXIS XG*].



- En la barra de título de la vista, haga clic en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

- ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla de la vista en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl+V.

22 ADAPTAR LA VISTA 3D

Puede modificar la posición de la vista **3D** en cualquier momento. Encontrará información sobre ello en *Modificar la posición de la vista 3D* [▶ *Página 83 - SIDEXIS XG*].

Para configurar la vista **3D**, están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 84 - SIDEXIS XG*]
- *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 85 - SIDEXIS XG*]
- *Girar la vista 3D* [▶ *Página 142 - SIDEXIS XG*]

22.1 MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D

Existen dos opciones para modificar la posición de la vista **3D**:

- Realizar una modificación interactiva
- Seleccionar la posición estándar de la vista.

MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D DE FORMA INTERACTIVA

Para modificar la posición de la vista **3D** de forma interactiva, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista **3D**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una mano.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La posición de la vista se modifica según el movimiento del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la vista **3D**.

SELECCIONAR LA POSICIÓN ESTÁNDAR DE LA VISTA.

Para seleccionar la posición estándar en la vista **3D**, haga lo siguiente:



1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior izquierda de la vista **3D** sobre el símbolo Cabezal de orientación.
 - ▶ Se abre la ventana transparente **Posición de la vista**:



- ▶ En el centro de la ventana transparente **Posición de la vista** se encuentra el Cabezal de orientación destacado, que indica la posición actual de la vista.
2. Haga clic en el símbolo del Cabezal de orientación que indica la posición estándar deseada.
 - ▶ La posición de la vista **3D** se modifica según su selección.
3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Posición de la vista**.
 - ▶ La ventana transparente **Posición de la vista** se cierra.

22.2 CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA VISTA 3D




Todos los modos de visualización están disponibles en todas las áreas de trabajo.

Para cambiar el modo de visualización de la vista **3D**, haga lo siguiente:

La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 70 - SIDEXIS XG*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar modo de visualización**.

► Se abre la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**:

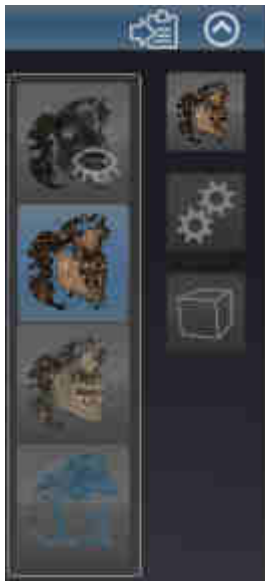

2. Haga clic en el símbolo del modo de visualización que desee.

► SICAT Endo activa el modo de visualización deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**.

► La ventana transparente **Cambiar modo de visualización** se cierra.

22.3 CONFIGURAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN ACTIVO DE LA VISTA 3D



Tan solo los modos de visualización configurables muestran el icono **Configurar modo de visualización activo**. La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** muestra tan solo los ajustes que son relevantes para el modo de visualización activo.

Para configurar el modo de visualización activo de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ☑ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 70 - SIDEXIS XG*].
- ☑ El modo de visualización deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 84 - SIDEXIS XG*].
- ☑ El modo de visualización activo es configurable.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Configurar modo de visualización activo**.

▶ Se abre la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**:



2. Desplace la corredera que desee.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
3. Haga clic en el símbolo de flecha junto a **Ajustes avanzados**, si está disponible.
 - ▶ Se abre el área **Ajustes avanzados**.
4. Active o desactive las casillas de comprobación disponibles.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según el estado de las casillas de comprobación.
5. Desplace la corredera que desee.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
6. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**.
 - ▶ La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** se cierra.



Puede restablecer los ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Restablecer el ajuste predeterminado de la configuración del modo de visualización activo**.



Puede guardar los ajustes actuales como ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Guardar la configuración del modo de visualización activo como ajuste predeterminado**.

22.4 CAMBIAR EL MODO DE DETALLE DE LA VISTA 3D

Para cambiar el modo de detalle de la vista **3D**, haga lo siguiente:

La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 70 - SIDEXIS XG*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar el modo de detalle**.

▶ Se abre la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**:



2. Haga clic en el símbolo del modo de detalle deseado.

▶ SICAT Endo activa el modo de detalle deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**.

▶ La ventana transparente **Cambiar el modo de detalle** se cierra.

23 ALINEACIÓN DE VOLUMEN Y ÁREA PANORÁMICA



Si es necesario adaptar la alineación del volumen, hágalo cuando comience a trabajar con la radiografía 3D. Si la alineación del volumen se adapta más tarde, quizá sea necesario repetir partes del diagnóstico o de la planificación.

ALINEACIÓN DE VOLUMEN

Es posible adaptar la alineación del volumen para todas las vistas girando el volumen en torno a los tres ejes principales. Esto puede resultar útil en los siguientes casos:


- El paciente no tiene una posición óptima en la radiografía 3D
- La alineación se corresponde al caso de aplicación, por ejemplo, alineación de los cortes axiales en paralelo a la horizontal de Frankfurt o en paralelo al plano oclusal
- Optimización de la vista panorámica.

Si la alineación del volumen se ajusta en SICAT Endo, los cambios se aplican al resto de aplicaciones SICAT.

La manera de ajustar la alineación del volumen se explica en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 90 - SIDEXIS XG*].

ÁREA PANORÁMICA

SICAT Endo calcula la vista **Panorámica** a partir del volumen y del área panorámica. Para optimizar la vista **Panorámica** debe ajustar el área panorámica en los dos maxilares del paciente. Esto es importante para un diagnóstico y una planificación del tratamiento efectivos y eficientes.

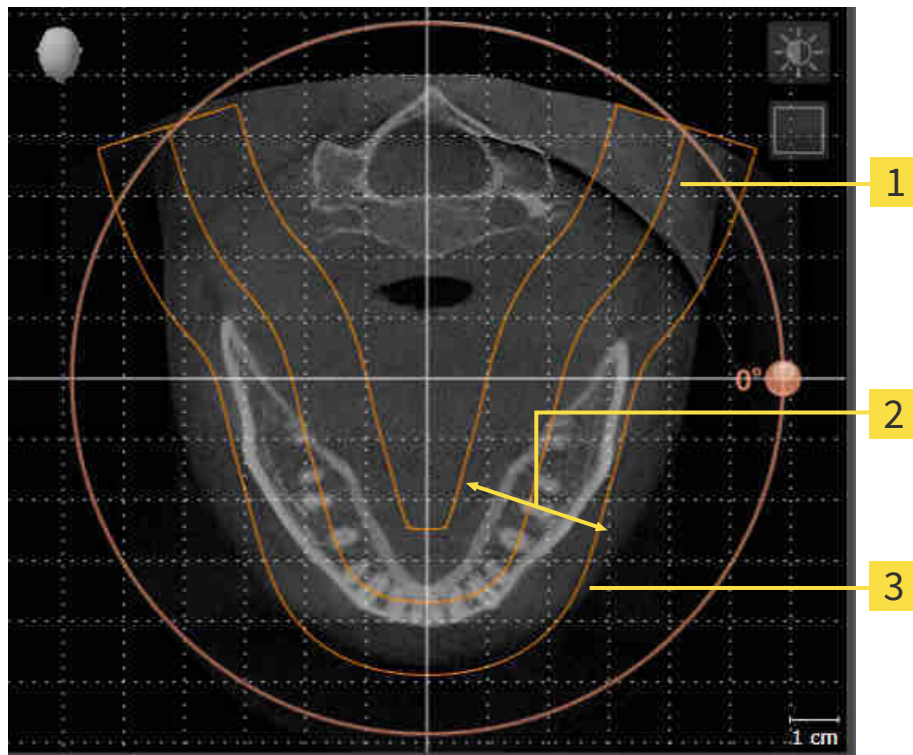

1 Curva panorámica

2 Grosor

3 Área panorámica

El área panorámica se determina mediante estos dos componentes:

- Forma y posición de la curva panorámica
- Grosor del área panorámica.

Para ajustar de forma óptima el área panorámica, deben cumplirse estas dos condiciones:

- El área panorámica debe contener por completo todos los dientes y los dos maxilares.
- El área panorámica debe ser lo más estrecha posible.

Si el área panorámica se ajusta en SICAT Endo, los cambios se aplican al resto de aplicaciones SICAT.

Encontrará la manera de ajustar el área panorámica en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 95 - SIDE-XIS XG*].

23.1 AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN

Encontrará información general sobre la alineación del volumen en *Alineación de volumen y área panorámica* [► *Página 88 - SIDEXIS XG*].

El ajuste de la alineación del volumen consta de los siguientes pasos:


- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Girar el volumen en la vista **Coronal**
- Girar el volumen en la vista **Sagital**
- Girar el volumen en la vista **Axial**

ABRIR LA VENTANA AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA

☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.
- Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

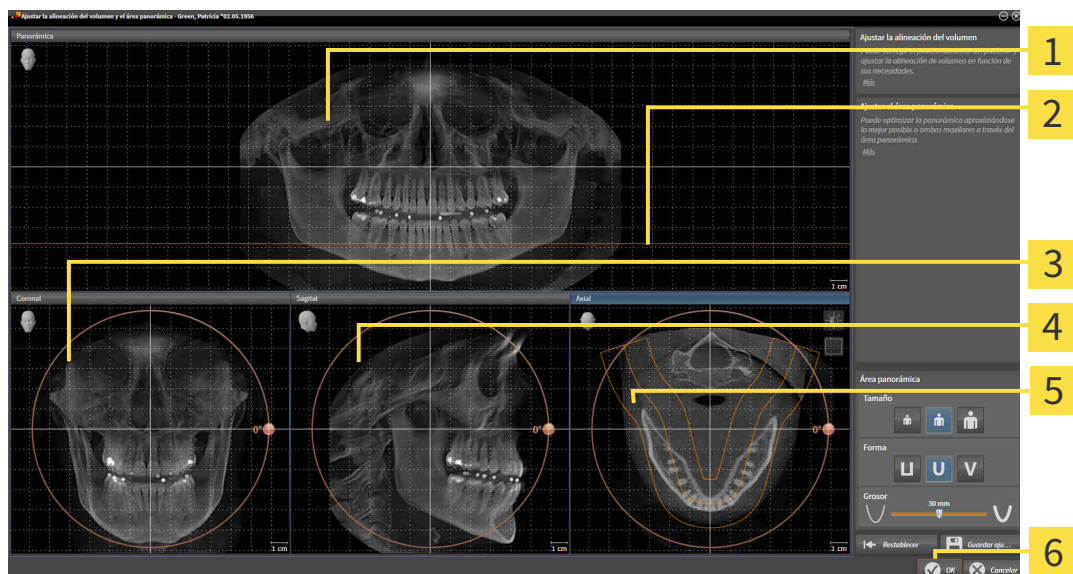

1 Panorámica Vista

2 Línea de referencia axial

3 Coronal Vista con regulador de **Giro**

4 Sagittal Vista con regulador de **Giro**

5 Axial Vista con regulador de **Giro**

6 Botón **OK**

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA CORONAL

1. Active la vista **Coronal**:




- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de corte o símbolo Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Giro Regulador de | |

2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Coronal**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA SAGITAL

1. Active la vista **Sagital**:

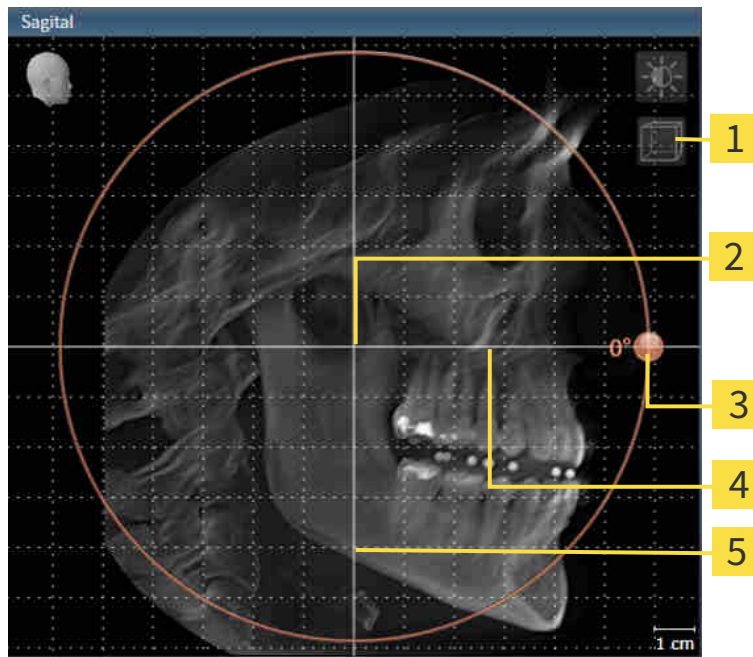


- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de corte o símbolo Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Giro Regulador de | |

2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Sagital**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. Active la vista **Axial**:

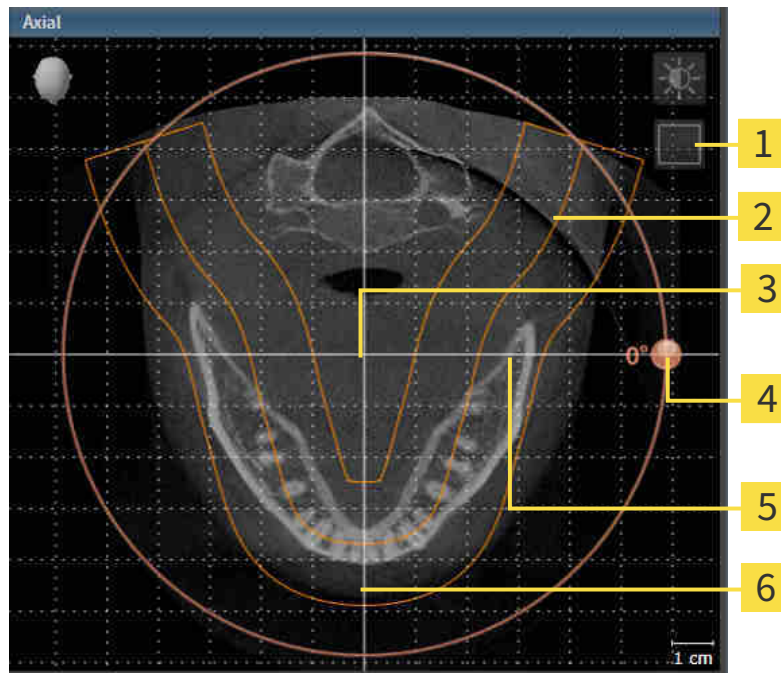

- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de proyección o símbolo Activar el modo de corte | 4 Giro Regulador de |
| 2 Área panorámica | 5 Línea de referencia horizontal |
| 3 Centro de rotación | 6 Línea de referencia vertical |

2. Asegúrese de que el modo de cortes está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
3. Desplácese hasta un corte con las raíces de los dientes de la mandíbula, por ejemplo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la línea de referencia axial en la vista panorámica y moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo sin soltar el botón.
4. En caso necesario, desplace el área panorámica en la vista **Axial** haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el área panorámica y moviendo el ratón sin soltar el botón izquierdo. SICAT Endo desplaza el centro de rotación, la línea de referencia horizontal y la línea de referencia vertical.
5. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
8. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia el área panorámica, la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.
9. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.

- ▶ Si el ajuste de la alineación del volumen tiene efectos en objetos existentes en aplicaciones SICAT, SICAT Endo abre una ventana de notificación que informa sobre los efectos concretos.
10. Si a pesar de ello desea ajustar la alineación del volumen, haga clic en el botón **Ajustar** de la ventana de notificación.
- ▶ SICAT Endo guarda la alineación de volumen ajustada y muestra el volumen alineado de la manera que corresponda en todas las vistas.

Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:



- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 73 - SIDEXIS XG*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Endo sincroniza el zoom entre las vistas, exceptuando la vista **Axial**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica, puede hacer clic en el botón **Restablecer**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.

23.2 AJUSTAR EL ÁREA PANORÁMICA

Encontrará información general sobre el área panorámica en *Alineación de volumen y área panorámica* [**►** *Página 88 - SIDEXIS XG*].

El ajuste del área panorámica consta de los siguientes pasos:

- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Ajustar la posición de los cortes de la vista **Axial**
- Desplazar el área panorámica
- Girar el volumen en la vista **Axial**
- **Tamaño**Ajustar , **Forma** y **Grosor** del área panorámica


ABRIR LA VENTANA AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA

El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.

► Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

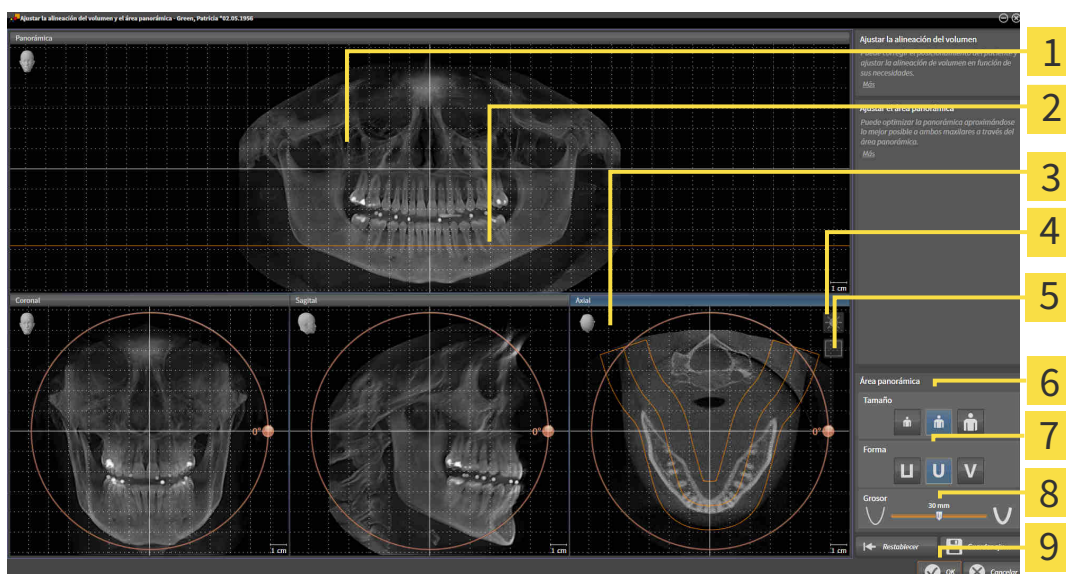

1 PanorámicaVista

2 Línea de referencia axial

3 AxialVista con regulador de Giro

4 Símbolo **Ajustar brillo y contraste**

5 Símbolo **Activar el modo de proyección** o símbolo **Activar el modo de corte**

6 TamañoBotones

7 FormaBotones

8 GrosorCorredera

9 Botón **OK**

AJUSTAR LA POSICIÓN DE LOS CORTES DE LA VISTA AXIAL



1. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de cortes. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
2. En la vista **Panorámica**, sitúe el puntero del ratón sobre la línea de referencia axial. La línea de referencia axial muestra la posición actual de los cortes de la vista **Axial**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ El corte de la vista **Axial** se ajusta conforme a la posición de la línea de referencia axial en la vista **Panorámica**.
5. Cuando la línea de referencia axial se encuentre en las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ La vista **Axial** mantiene el corte actual.

DESPLAZAR EL ÁREA PANORÁMICA

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el área panorámica.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo desplaza el área panorámica según la posición del puntero del ratón.
4. Cuando la curva central del área panorámica siga a las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El área panorámica mantiene su posición actual.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
4. Cuando las raíces de los dientes de la mandíbula sigan a la curva central del área panorámica, suelte el botón izquierdo del ratón.

AJUSTAR TAMAÑO, FORMA Y GROSOR DEL ÁREA PANORÁMICA



1. Seleccione la **Tamaño** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Tamaño** correspondiente.



2. Seleccione la **Forma** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Forma** correspondiente.



3. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de proyección. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.



4. Seleccione el **Grosor** del área panorámica desplazando la corredera **Grosor**. Asegúrese de que el área panorámica contenga por completo todos los dientes y los dos maxilares. Mantenga un grosor lo más bajo posible.

5. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.

- SICAT Endo guarda la alineación de volumen ajustada y el área panorámica ajustada y muestra la vista **Panorámica** correspondiente.

Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:



- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [► *Página 73 - SIDEXIS XG*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Endo sincroniza el zoom entre las vistas, exceptuando la vista **Axial**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica, puede hacer clic en el botón **Restablecer**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.

24 IMPRESIONES ÓPTICAS



Solo puede importar y registrar impresiones ópticas de datos radiográficos que se hayan generado con equipos de rayos X 3D de Sirona.

SICAT Endo puede mostrar simultáneamente datos radiográficos e impresiones ópticas concordantes del mismo paciente. La visualización combinada ofrece información adicional para el análisis y el diagnóstico. Además, la implementación de la terapia se basa en las impresiones ópticas.

Para utilizar datos con impresiones ópticas en SICAT Endo son necesarias las siguientes acciones:

- Registro de impresiones ópticas en datos radiográficos.

SICAT Endo admite los siguientes formatos de archivo para impresiones ópticas:

- Archivos SIXD que contengan una impresión óptica del maxilar y una impresión óptica de la mandíbula
- Archivos SSI que contengan una impresión óptica del maxilar y una impresión óptica de la mandíbula
- Archivos STL que contengan una impresión óptica del maxilar o una impresión óptica de la mandíbula (se requiere licencia de **SICAT Suite STL Import**)

Las siguientes herramientas están disponibles para las impresiones ópticas:

- *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 99 - SIDEXIS XG*]
- *Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT* [▶ *Página 106 - SIDEXIS XG*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: encontrará información sobre ello en Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*].
- *Enfocar impresiones ópticas y eliminar impresiones ópticas: encontrará más información al respecto en Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 55 - SIDEXIS XG*].

Las impresiones ópticas en formato STL requieren pasos adicionales al importar. Encontrará información sobre ello en *Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL* [▶ *Página 105 - SIDEXIS XG*].

24.1 IMPORTAR Y REGISTRAR IMPRESIONES ÓPTICAS


PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.


PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.


PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.


PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.


PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.


PRECAUCIÓN

Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.


PRECAUCIÓN

La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.


PRECAUCIÓN

Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.



Puede utilizar la **Ventana explor** para comprobar si una impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos. Puede desplazar la **Ventana explor** y desplazarse por los cortes en la **Ventana explor**.

Encontrará información general sobre las impresiones ópticas en *Impresiones ópticas* [► *Página 98 - SIDEXIS XG*].


Para importar y registrar una impresión óptica, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**.
3. En la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**, vaya al archivo con una impresión óptica que desee, selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
 - La ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas** se cierra.


► SICAT Endo abre el archivo con la impresión óptica seleccionado:

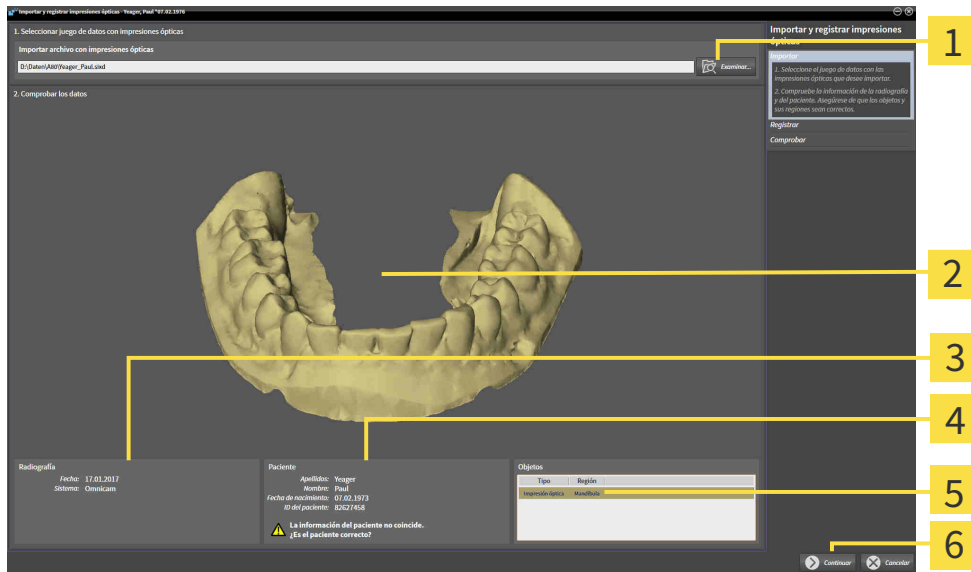

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Área Importar archivo con impresiones ópticas | 4 Información del paciente |
| 2 3D Vista de la impresión óptica | 5 Lista de objetos |
| 3 Información de la radiografía | 6 Botón Continuar |


4. Compruebe la información de la radiografía y la información del paciente.
5. Asegúrese de que los objetos y sus regiones sean correctos. El color de fondo de la lista de objetos se corresponde con el color de los objetos de la vista **3D**.
6. Haga clic en **Continuar**.

- ▶ Si los datos de los pacientes son diferentes en la radiografía 3D y en la impresión óptica, SICAT Endo abre la ventana **Información del paciente diferente**:

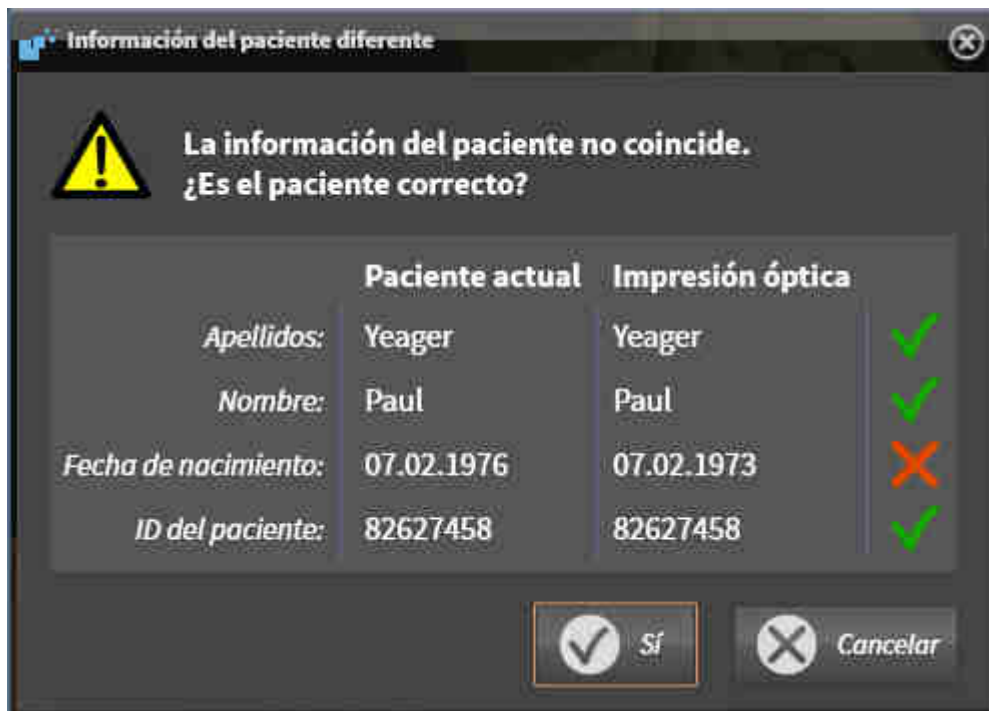


- 7. Compare los datos de los pacientes. Si está seguro de que la impresión óptica coincide con el paciente actual, haga clic en el botón **Sí**.

- ▶ El paso **Registrar** se abre:

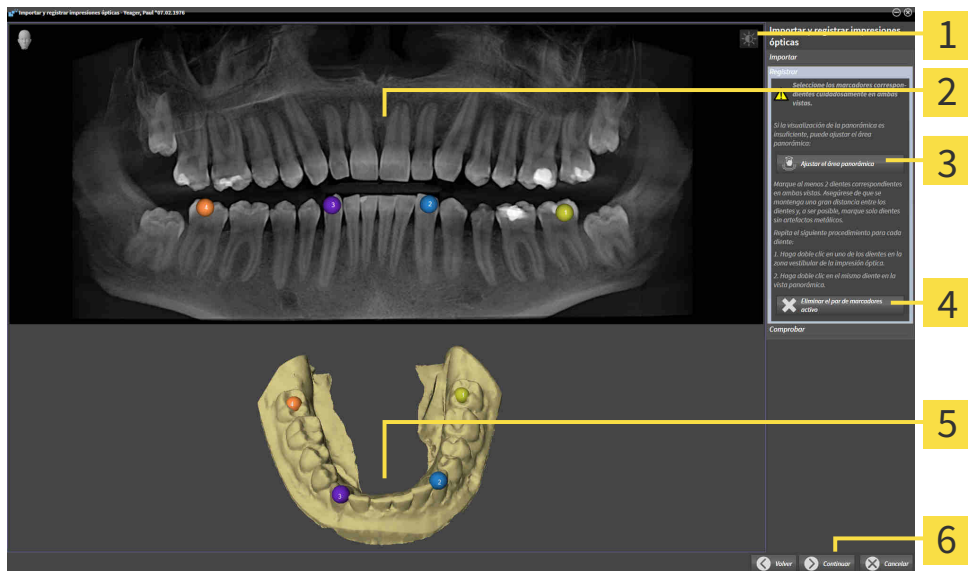

- | | |
|--|--|
| 1 Símbolo Ajustar brillo y contraste | 4 Botón Eliminar el par de marcadores activo |
| 2 Panorámica Vista | 5 3D Vista que muestra la impresión óptica |
| 3 Botón Ajustar el área panorámica | 6 Botón Continuar |

8. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el mismo diente para la impresión óptica tanto en la vista **Panorámica** como en la cara vestibular de la impresión óptica en la vista **3D**. Asegúrese de que se mantenga una gran distancia entre los dientes y marque solo dientes sin artefactos metálicos. Repita este paso hasta que se hayan identificado al menos dos dientes coincidentes en ambas vistas.
 - ▶ Las marcas con distintos colores y números en ambas vistas indican los dientes asignados en la impresión óptica.
9. Haga clic en **Continuar**.
 - ▶ SICAT Endo calcula el registro de la impresión óptica con los datos radiográficos.
 - ▶ El paso **Comprobar** se abre:

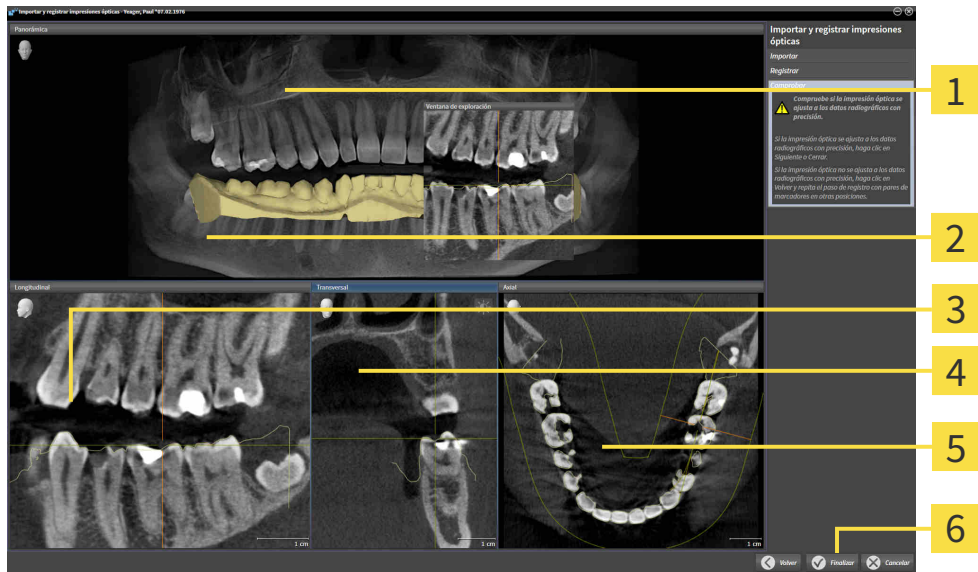

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Panorámica Vista | 4 Transversal Vista |
| 2 Ventana explor | 5 Axial Vista |
| 3 Longitudinal Vista | 6 Botón Finalizar |

10. En las vistas de corte 2D, compruebe si la impresión óptica se ajusta a los datos radiográficos con precisión. Desplácese por los cortes y compruebe los contornos mostrados.
11. Si la impresión óptica no se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Volver** y repita el paso **Registrar** con los pares de marcadores en otras posiciones.
12. Si la impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ SICAT Endo añade la impresión óptica seleccionada al **Navegador de objetos**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la impresión óptica registrada.

Además del procedimiento descrito, en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** están disponibles las siguientes acciones:



- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 73 - SIDEXIS XG*].
- Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 95 - SIDEXIS XG*].
- Si desea eliminar un par de marcadores determinado en el paso **Registrar**, seleccione uno de los marcadores del par y haga clic en el botón **Eliminar el par de marcadores activo**.
- Si desea cancelar la importación y el registro de impresiones ópticas, haga clic en **Cancelar**.

24.2 PASOS ADICIONALES PARA LAS IMPRESIONES ÓPTICAS EN FORMATO STL

Los archivos STL no contienen información sobre la posición y la orientación de las impresiones ópticas. Por ello, debe adaptar la posición y la orientación en caso necesario:

Ha activado ya una licencia **SICAT Suite STL Import**.

1. Abra las impresiones ópticas desde un archivo en formato STL. Encontrará información sobre ello en Importar y registrar impresiones ópticas.

► Se abre la ventana **STL Import-Assistent**:



1 Selección del maxilar

3 Cambio del lado interno y el externo

2 Cambio de orientación

4 Botón **OK**

2. En el área **Maxilar**, seleccione si la impresión óptica contiene el **maxilar** o la **mandíbula** haciendo clic en el símbolo correspondiente.



3. Si es necesario, modifique la orientación de las impresiones ópticas para un posicionamiento previo aproximado haciendo clic en los símbolos de las flechas o los símbolos de rotación en el área **Orientación**.
4. Si es necesario, cambie el lado interno y externo de las impresiones ópticas haciendo clic en la representación de las impresiones ópticas en el área **Parámetros**.
5. Haga clic en el botón **OK**.
6. Si es necesario, repita los pasos para un segundo archivo STL. SICAT Endo asigna automáticamente el segundo archivo STL al otro maxilar.
 - SICAT Endo muestra las impresiones ópticas importadas en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
7. Continúe registrando las impresiones ópticas. Encontrará información sobre ello en Importar y registrar impresiones ópticas.

24.3 REUTILIZAR IMPRESIONES ÓPTICAS PROCEDENTES DE OTRAS APLICACIONES SICAT


PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.


PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.


PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.


PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.


PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.


PRECAUCIÓN

Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.

Encontrará información general sobre las impresiones ópticas en *Impresiones ópticas* [► *Página 98 - SIDEXIS XG*].

Para reutilizar impresiones ópticas procedentes de otra aplicación SICAT, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.

- ☑ Tiene un estudio abierto en otra aplicación SICAT y ya ha importado a él impresiones ópticas que todavía no está utilizando en SICAT Endo.
 - 1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
 - 2. En el área **Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT**, haga clic en la línea donde estén las impresiones ópticas que desee.
 - 3. SICAT Endo muestra las impresiones ópticas seleccionadas:
 - 4. Compruebe la información de la radiografía y la información del paciente. Asegúrese de que los objetos y sus regiones sean correctos. El color de fondo de la lista de objetos se corresponde con el color de los objetos de la vista **3D**.
 - 5. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ SICAT Endo añade las impresiones ópticas seleccionadas al **Navegador de objetos**.
 - ▶ SICAT Endo muestra las impresiones ópticas seleccionadas:
- Si desea cancelar la importación de impresiones ópticas de otra aplicación SICAT, haga clic en **Cancelar**.

25 RADIOGRAFÍAS INTRAORALES


PRECAUCIÓN

Los dispositivos para radiografías intraorales no aprobados como productos médicos podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de utilizar para las radiografías intraorales únicamente dispositivos aprobados como productos médicos.


PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de las radiografías intraorales importadas.


PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que las radiografías intraorales se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D.


PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no coincidan con el paciente ni con la radiografía 3D o cuyo momento de adquisición diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que, en una radiografía intraoral, coincidan el paciente y la radiografía 3D, y de que el momento de adquisición no diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D.


PRECAUCIÓN

Una calidad insuficiente de las radiografías intraorales o las radiografías 3D podrían conllevar que el mecanismo de registro de las radiografías intraorales fallara.

Utilice únicamente radiografías intraorales y radiografías 3D que permitan un registro correcto.


PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente radiografías intraorales que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.


PRECAUCIÓN

Una posición u orientación incorrecta de las radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Después del registro, compruebe la correcta posición y orientación de las radiografías intraorales con los dientes en la radiografía 3D.

**PRECAUCIÓN**

Una orientación incorrecta de las radiografías intraorales en relación con las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Compruebe que las radiografías intraorales registradas estén correctamente adaptadas a la radiografía 3D.
2. En caso necesario, gire las radiografías intraorales para orientarlas correctamente.

**PRECAUCIÓN**

Una asignación incorrecta de los números de dientes podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que coincidan los números de dientes seleccionados y los números de dientes anatómicos reales.

Puede utilizar radiografías intraorales en SICAT Endo para preparar el diagnóstico y planificar el tratamiento. Las radiografías intraorales pueden importarse y administrarse en la ventana **Radiograph Manager**.

Para utilizar radiografías intraorales en SICAT Endo son necesarias las siguientes acciones:

- Importación de archivos DICOM que contengan radiografías intraorales
- Asignación de números de dientes a las radiografías intraorales
- Registro de las radiografías intraorales

SICAT Endo compatible con el siguiente formato de archivos para las radiografías intraorales:

- Datos DICOM presentes como archivos Single-Frame

Encontrará una lista de sistemas de adquisición compatibles en *Sensores de radiografías intraorales compatibles* [▶ *Página 110 - SIDEXIS XG*].

Para las radiografías intraorales están disponibles las siguientes acciones:

- *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 111 - SIDEXIS XG*]
- *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ *Página 115 - SIDEXIS XG*]
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 117 - SIDEXIS XG*]

25.1 SENSORES DE RADIOGRAFÍAS INTRAORALES COMPATIBLES

SICAT Endo compatible con los siguientes sensores de radiografías intraorales:

- XIOS XG Supreme, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- XIOS XG Select, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- XIOS Plus, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- Schick 33, fabricante: Sirona Dental Inc., EE. UU.
- Schick Elite, fabricante: Sirona Dental Inc., EE. UU.

25.2 IMPORTAR RADIOGRAFÍAS INTRAORALES Y ASIGNAR DIENTES

Encontrará información general sobre las radiografías intraorales en *Radiografías intraorales* [▶ *Página 108 - SIDEXIS XG*].


Para importar radiografías intraorales y asignar uno o más dientes, proceda de la siguiente manera:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 49 - SIDEXIS XG*].
- ☑ La radiografía intraoral aún no está en SICAT Endo. Puede importar cada radiografía intraoral tan solo una vez.
- ☑ La radiografía intraoral está disponible como archivo DICOM en formato Single-Frame.
- ☑ La radiografía intraoral ha sido creada con un dispositivo de radiografías intraorales compatible. Encontrará información sobre ello en *Sensores de radiografías intraorales compatibles* [▶ *Página 110 - SIDEXIS XG*].



1. Haga clic en el símbolo **Administrando y registrando radiografías intraorales**.
 - ▶ Se abre la ventana **Radiograph Manager**.
2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - ▶ Se abre la ventana **Abrir radiografía intraoral**.
3. En la ventana **Abrir radiografía intraoral**, pase al archivo deseado con radiografías intraorales y seleccione como mínimo un archivo. Puede importar varias radiografías a la vez manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** y seleccionando sucesivamente varios archivos.
4. Haga clic en **Abrir**.
 - ▶ La ventana **Abrir radiografía intraoral** se cierra.

► SICAT Endo muestra las radiografías intraorales importadas:

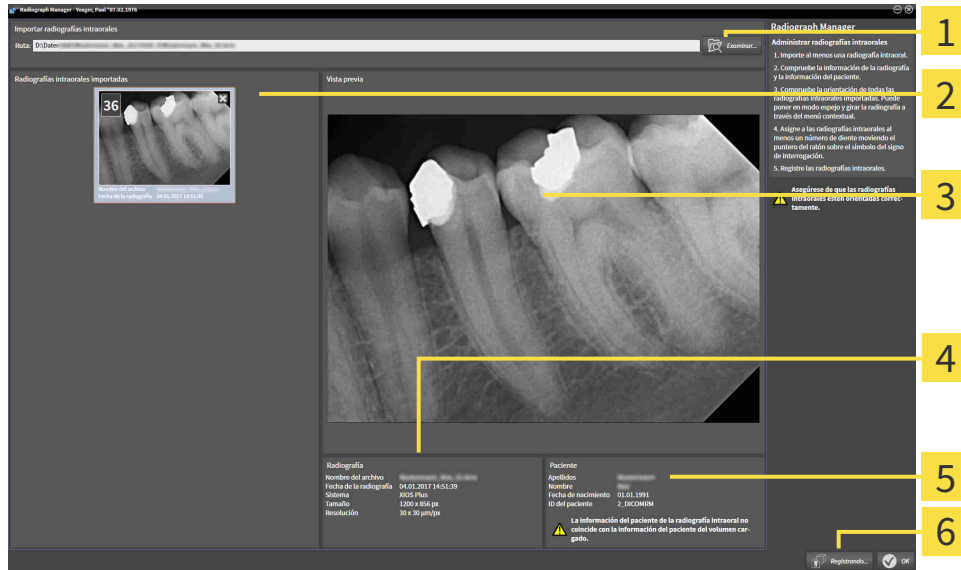

- 1** Botón **Examinar**
- 2** Área **Radiografías intraorales importadas**
- 3** Área **Vista previa**
- 4** Información del paciente
- 5** Información de la radiografía
- 6** Botón **Registrando**

5. Para seleccionar una radiografía intraoral importada, haga clic en una radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas**.

► SICAT Endo muestra la radiografía seleccionada en el área **Vista previa**.

6. Compruebe la información sobre el paciente y la información sobre la radiografía. Asegúrese de que la radiografía y el paciente coincidan y de que los datos de la radiografía 3D y la radiografía intraoral no disten en más de 90 días.

7. Asegúrese de que la radiografía intraoral importada tenga la orientación anatómica correcta.

8. Si una radiografía intraoral importada no tiene la orientación anatómica correcta, haga clic con el ratón derecho en la radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas** y, en el menú contextual, seleccione una de las entradas **Modo espejo horizontal**, **Modo espejo vertical**, **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj** o **Girar en el sentido de las agujas del reloj**.


► SICAT Endo refleja la radiografía en el eje horizontal o vertical de la imagen.

► SICAT Endo gira la radiografía en pasos de 90 grados a la izquierda o a la derecha.



9. Mueva el puntero del ratón por el símbolo de interrogación en una radiografía.

- Se abre la ventana **Número de diente**:

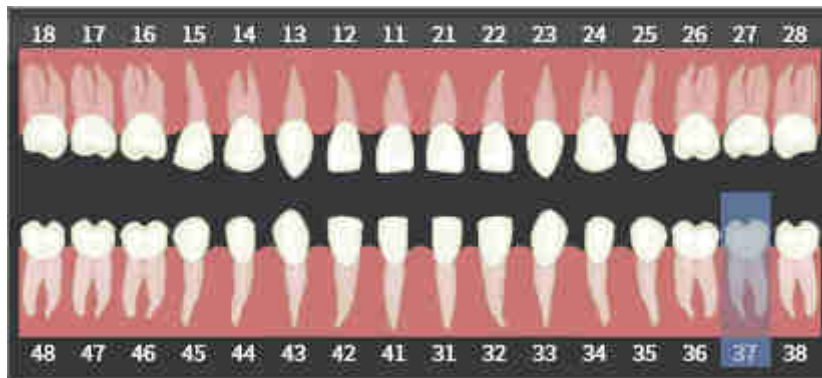

10. Asigne hasta cuatro números de dientes a la radiografía haciendo clic sucesivamente en los números de dientes anatómicamente correctos.
 11. Para cerrar la ventana **Número de diente**, posicione el puntero del ratón fuera de la ventana.
- SICAT Endo cierra la ventana **Número de diente**.
 - SICAT Endo muestra los números de dientes asignados en las radiografías intraorales.
 - SICAT Endo guarda los cambios realizados al salir del Radiograph Manager.

En el área **Radiografías intraorales importadas** puede activar las siguientes funciones a través del menú contextual:



- **Modo espejo horizontal**
- **Modo espejo vertical**
- **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj**
- **Girar en el sentido de las agujas del reloj**
- **Número de diente**
- **Registrando**
- **Eliminar**

Para eliminar radiografías intraorales importadas del área **Radiografías intraorales importadas**, tiene las siguientes posibilidades:



- Haga clic en el símbolo **Eliminar radiografía intraoral del proyecto de planificación** en una radiografía.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en una radiografía y seleccione en el menú contextual la entrada **Eliminar**.
- Marque una radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas** y pulse la tecla **Supr**.

Para registrar una radiografía intraoral importada, continúe con la siguiente sección:

- *Asistente de registro* [► *Página 114 - SIDEXIS XG*]

26 ASISTENTE DE REGISTRO

El asistente de registro le proporciona funciones para registrar radiografías intraorales.

Para poder utilizar el asistente de registro, deberá tener las radiografías intraorales importadas y con números de dientes asignados. Encontrará información sobre ello en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 111 - SIDEXIS XG*].

Antes de comenzar el trabajo con el asistente de registro, deberá seleccionar la radiografía intraoral que desee registrar.

En el asistente de registro puede llevar a cabo una orientación previa de la radiografía intraoral en la curva panorámica. Con la vista **Proyección en 3D** puede seguir refinando la orientación antes de que SICAT Endo registre la radiografía intraoral automáticamente.

El asistente de registro comprende los siguientes pasos:

- *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ *Página 115 - SIDEXIS XG*]
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 117 - SIDEXIS XG*]

Si no es suficiente el posicionamiento previo en la vista **Panorámica**, en el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede adaptar la orientación también a través de la vista **Transversal** o la vista **Axial**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial* [▶ *Página 120 - SIDEXIS XG*].

Si una radiografía intraoral contiene áreas que podrían causar problemas en el registro, en el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede poner una máscara de color a estas áreas y excluirlas del registro. Encontrará información sobre ello en *Poner máscaras en áreas* [▶ *Página 123 - SIDEXIS XG*].


26.1 POSICIONAR PREVIAMENTE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

Encontrará información general sobre el asistente de registro en *Asistente de registro* [► *Página 114 - SIDEXIS XG*].

En el paso **Posicionar previamente la radiografía intraoral** puede orientar la radiografía intraoral a la curva panorámica de tal manera que se dé la mejor cobertura posible entre la radiografía 3D y la radiografía intraoral.

- ✓ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 49 - SIDEXIS XG*].
- ✓ Ha importado al menos una radiografía intraoral y ha asignado al menos un número de diente a la radiografía intraoral. Encontrará información sobre ello en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [► *Página 111 - SIDEXIS XG*].

1. Haga clic en el símbolo **Administrando y registrando radiografías intraorales**.
 - Se abre la ventana **Radiograph Manager**.
2. Para seleccionar una radiografía intraoral para el registro, haga clic en ella con el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo marca la radiografía.
3. Haga clic en el botón **Registrando**.
 - El paso **Posicionar previamente la radiografía intraoral** se abre:

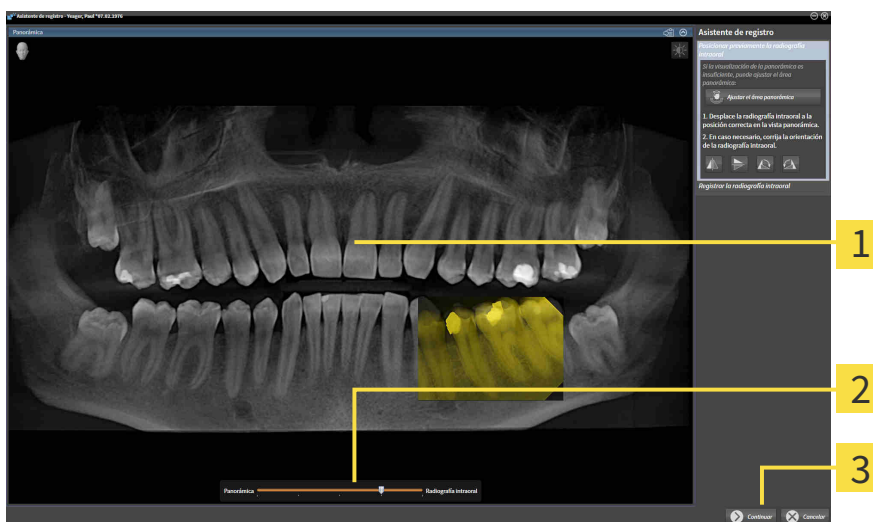

1 Ventana **Panorámica**

3 Botón **Continuar**

2 El regulador de **transparencia**

- SICAT Endo muestra en la ventana **Panorámica** la radiografía intraoral en la curva panorámica.
4. Para desplazar la radiografía intraoral, posicione el puntero del ratón en la radiografía.
 5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 6. Desplace la radiografía intraoral a la posición deseada.
 7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene la posición actual de la radiografía intraoral.

8. En caso necesario, puede adaptar la orientación de la radiografía intraoral en el área **Posicionar previamente la radiografía intraoral** a través de los botones **Modo espejo horizontal**, **Modo espejo vertical**, **Girar en el sentido de las agujas del reloj** o **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj**.
9. Para acceder al siguiente paso del registro, haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Registrar la radiografía intraoral** se abre.

Para iniciar el registro de una radiografía intraoral, de manera alternativa puede proceder de la siguiente manera:



- Haga doble clic en la radiografía intraoral en el área **Radiografías intraorales importadas**.
- Marque la radiografía intraoral en el área **Radiografías intraorales importadas** y pulse la **tecla Intro**.
- En el área **Radiografías intraorales importadas**, haga clic en la radiografía intraoral con el botón derecho del ratón y seleccione en el menú contextual la entrada **Registrando**.




Para comprobar la correcta cobertura entre la radiografía intraoral y la vista panorámica, puede adaptar la transparencia con el regulador de **transparencia**.

Continúe con *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 117 - SIDEXIS XG*].

26.2 REGISTRAR LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

Encontrará información general sobre el asistente de registro en *Asistente de registro* [► *Página 114 - SIDEXIS XG*].

En el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede llevar a cabo un ajuste preciso de la posición inicial de la radiografía intraoral antes de llevar a cabo el registro automático.

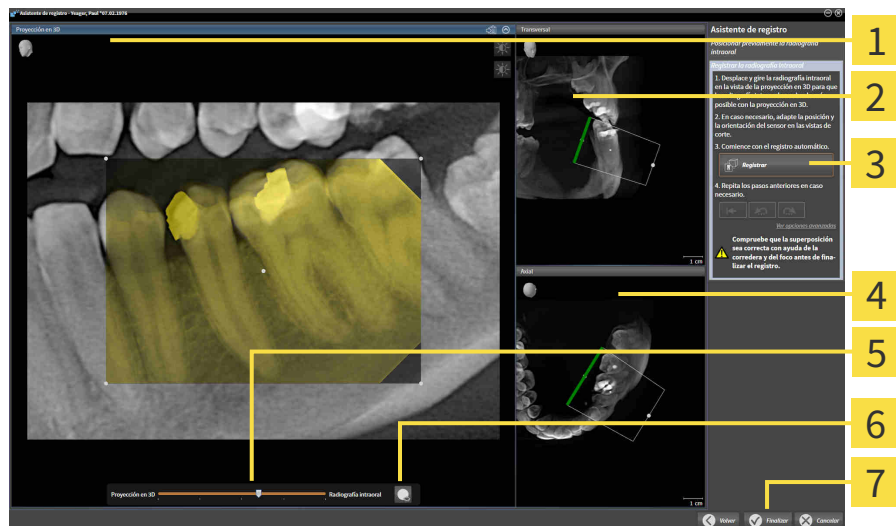

1 Proyección en 3D Vista

2 Transversal Vista

3 Botón **Registrar**

4 Axial Vista

5 El regulador de **transparencia**

6 Botón **Foco**

7 Botón **Finalizar**

Para adaptar la cobertura de la radiografía intraoral con la vista **Proyección en 3D**, haga lo siguiente:



1. En la vista **Proyección en 3D**, sitúe el puntero del ratón sobre la radiografía intraoral.
► El puntero del ratón se transforma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la radiografía intraoral a la posición deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
► SICAT Endo mantiene el giro actual de la radiografía intraoral.
► SICAT Endo adapta la vista **Transversal** y la vista **Axial** en correspondencia.



5. Para girar la radiografía intraoral, posicione el puntero del ratón en la vista **Proyección en 3D** sobre uno de los puntos de control en las esquinas de la radiografía.
► El puntero del ratón se transforma.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Gire la radiografía intraoral en la dirección deseada.

8. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la radiografía intraoral.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal** y la vista **Axial** en correspondencia.

ENCENDER Y APAGAR EL FOCO

Para comprobar la correcta cobertura de la radiografía intraoral con la proyección en 3D, en la vista **Proyección en 3D** puede aplicar un foco.



1. Haga clic en el botón **Foco**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la radiografía intraoral.
 - ▶ SICAT Endo muestra un foco.
3. Desplace el puntero del ratón al punto que desee comprobar de la radiografía intraoral.
4. Repita este paso para todos los puntos que desee comprobar.



5. Para volver a ocultar el foco, haga clic de nuevo en el botón **Foco**.
 - ▶ SICAT Endo oculta el foco.

ADAPTAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL O AXIAL

En caso de que no baste la orientación de la radiografía intraoral en la vista **Proyección en 3D**, puede orientar la adaptación también en la vista **Transversal** o en la vista **Axial**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial* [▶ *Página 120 - SIDEXIS XG*].

PONER MÁSCARAS EN LAS ÁREAS DE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

En caso de que desee descartar áreas determinadas de la radiografía intraoral del registro automático, puede poner una máscara de color a estas áreas. SICAT Endo no tiene en cuenta estas áreas con máscara en el registro automático. Encontrará información sobre ello en *Poner máscaras en áreas* [▶ *Página 123 - SIDEXIS XG*].

REALIZAR REGISTRO AUTOMÁTICO

- Para llevar a cabo el registro automático, en el área **Registrar la radiografía intraoral** haga clic en el botón **Registrar**.
 - ▶ SICAT Endo lleva a cabo el registro de la radiografía intraoral con la radiografía 3D.
 - ▶ SICAT Endo cierra el asistente de registro.
 - ▶ SICAT Endo muestra el resultado del registro en la ventana **Radiograph Manager**.

COMPROBAR REGISTRO

1. Compruebe el resultado del registro con ayuda de la vista **Proyección en 3D**, la vista **Transversal** y la vista **Axial**.
2. Si no está satisfecho con el resultado, puede adaptar la posición de la radiografía intraoral desplazando la radiografía intraoral con el ratón mediante «arrastrar y soltar».
3. Para terminar el registro, haga clic en el botón **Finalizar**.

▶ El **Asistente de registro** se cierra.

▶ Se abre la ventana **Radiograph Manager**.



▶ SICAT Endo muestra la radiografía intraoral como registrada en el área **Radiografías intraorales importadas** del **Radiograph Manager**.



Para comprobar la correcta cobertura entre la radiografía intraoral y la vista panorámica, puede adaptar la transparencia con el regulador de **transparencia**.



Para restablecer la última adaptación realizada, haga clic en el botón **Deshacer último paso**. Para restablecer todas las adaptaciones realizadas, haga clic en el botón **Deshacer todos los pasos**.


26.3 ADAPTAR LA ORIENTACIÓN PREVIA EN LA VISTA TRANSVERSAL Y AXIAL

Encontrará información general sobre la adaptación de la superposición de la radiografía intraoral con la proyección en 3D en *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 117 - SIDEXIS XG*].

Incluso si puede orientar la radiografía intraoral de forma anatómicamente correcta en la vista **Proyección en 3D**, en determinadas radiografías SICAT Endo no podría ser capaz de realizar el registro automático de la radiografía intraoral con la radiografía 3D.

Adapte en este caso el posicionamiento de la radiografía intraoral en la vista **Transversal** o en la vista **Axial**:

DESPLAZAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL

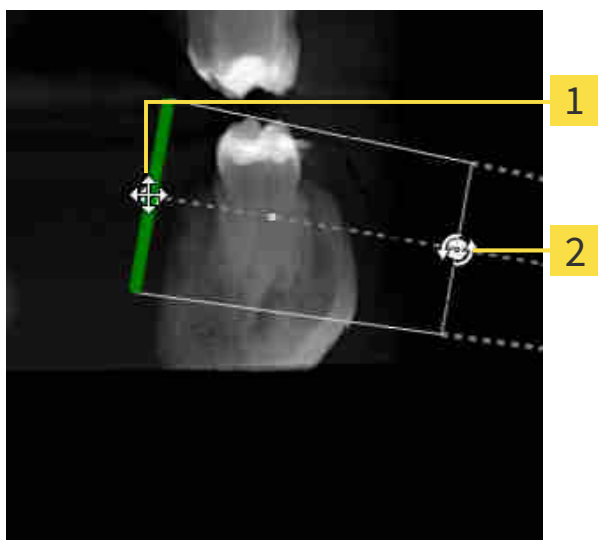

1 Punto de control **Uno**


2 Punto de control **Dos**

1. Para desplazar la orientación del aparato de rayos X y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Uno**.
 - El puntero del ratón se visualiza como una cruz con cuatro flechas.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Axial** en correspondencia.

GIRAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL

1. Para girar la orientación del aparato de rayos C y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Dos**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un círculo con dos flechas girándose.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Gire la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Axial** en correspondencia.

DESPLAZAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA AXIAL

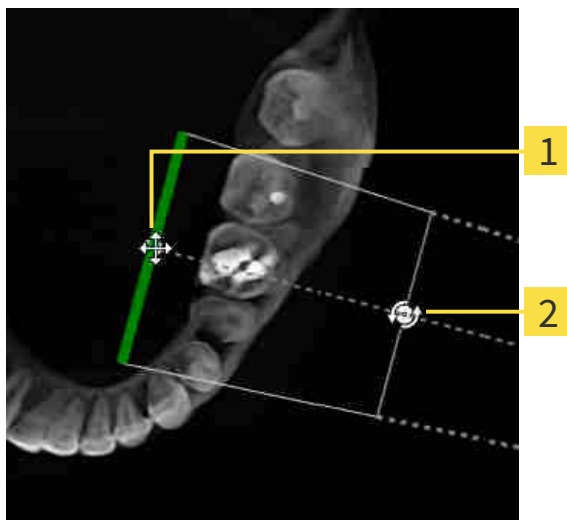

1 Punto de control **Uno**

2 Punto de control **Dos**

1. Para desplazar la orientación del aparato de rayos X y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Uno**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz con cuatro flechas.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Transversal** en correspondencia.

GIRAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA AXIAL

1. Para girar la orientación del aparato de rayos C y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Axial** sobre el punto de control **Dos**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un círculo con dos flechas girándose.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Gire la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Transversal** en correspondencia.

26.4 PONER MÁSCARAS EN ÁREAS

Una radiografía intraoral puede contener áreas que podrían causar problemas en el registro automático. Por ejemplo:

- Artefactos metálicos
- Dientes del maxilar opuesto
- Bordes de la radiografía intraoral que no pertenecen a la radiografía


Para evitar problemas en el registro automático, puede poner máscaras en estas áreas. SICAT Endo excluye todas las áreas con máscara del registro automático.

Para poner máscaras en áreas concretas de una radiografía intraoral, proceda de la siguiente manera:

1. Haga clic en el botón **Ver opciones avanzadas** del área **Registrar la radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra el botón **Editar máscara**.



2. Haga clic en el botón **Editar máscara**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la barra de herramientas de las máscaras en el borde derecho de la radiografía intraoral:

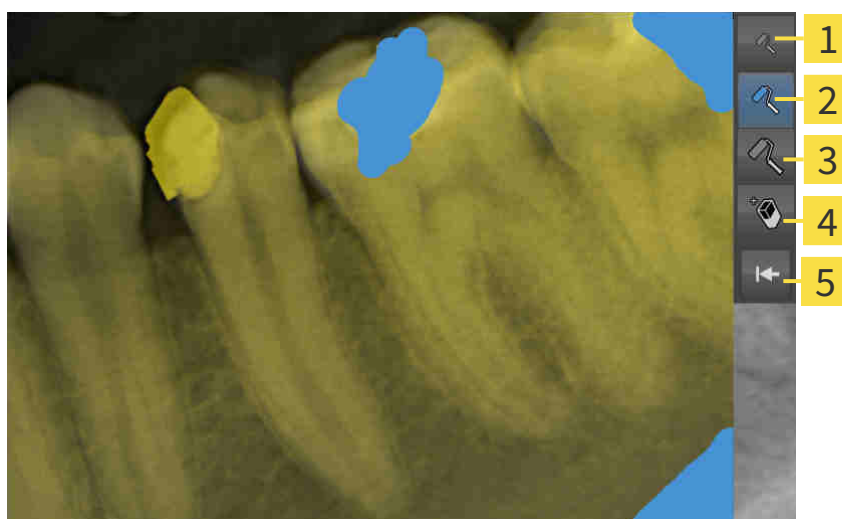

1 Botón **Utilizar el pincel pequeño**

4 Botón **Utilizar goma**

2 Botón **Utilizar el pincel mediano**

5 Botón **Restablecer máscara**

3 Botón **Utilizar el pincel grande**

3. Para colorear un área, haga clic en el botón **Utilizar el pincel pequeño**, el botón **Utilizar el pincel mediano** o el botón **Utilizar el pincel grande**.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma en un círculo.
4. Sitúe el puntero del ratón en el área que desee colorear de la radiografía intraoral.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
6. Mueva el puntero del ratón por el área que desee colorear.

7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el área marcada de color azul.
8. Repita los pasos en caso necesario para poner máscaras en otras áreas de la radiografía intraoral.
9. Para eliminar un área marcada de azul, haga clic en el botón **Utilizar goma**.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma en una goma.
10. Haga clic en el área marcada en azul que desee eliminar con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo elimina el área marcada de la radiografía intraoral.
11. Para eliminar todas las marcas realizadas, haga clic en el botón **Restablecer máscara**.
 - ▶ SICAT Endo elimina todas las áreas marcadas de azul de la radiografía intraoral.
12. En el área **Registrar la radiografía intraoral**, haga clic en el botón **Finalizar edición** para aplicar los cambios realizados.
 - ▶ SICAT Endo muestra el área con la máscara en la vista **Proyección en 3D**.
 - ▶ SICAT Endo excluye las áreas con máscara del registro automático.



Para volver a ocultar el botón **Editar máscara**, en el área **Registrar la radiografía intraoral** haga clic en el botón **Ocultar opciones avanzadas**.

27 ASISTENTE DE ENDOLINE

El asistente de EndoLine le proporciona funciones para el diagnóstico y la planificación del tratamiento.

Puede ejecutar de manera opcional las siguientes opciones antes de utilizar el asistente de EndoLine:

- *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 111 - SIDEXIS XG*].
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 117 - SIDEXIS XG*]
- *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [▶ *Página 133 - SIDEXIS XG*]

En el asistente de EndoLine puede determinar con ayuda de una línea de corte el área que desee tratar. En esta área puede colocar EndoLines en los canales de las raíces.

Los EndoLines son líneas de medición que puede utilizar para marcar el canal de la raíz a tratar y localizar las puntas de las raíces. Los EndoLines sirven de base para la planificación y colocación de canales de perforación.

Para visualizar los EndoLines, SICAT Endo usa diferentes vistas. Encontrará información sobre ello en *Vistas en el asistente de EndoLine* [▶ *Página 126 - SIDEXIS XG*].

SICAT Endo asigna al diente seleccionado todos los objetos que cree durante la planificación. Estos objetos pueden ser EndoLines o canales de perforación. Puede administrar y editar estos objetos en el área de trabajo **Panorámica** y en el área de trabajo **Radiografía intraoral**, así como en el **Navegador de objetos**.

Para ver los objetos creados, en SICAT Endo tiene diferentes vistas y composiciones de vistas en áreas de trabajo. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 60 - SIDEXIS XG*].

El asistente de EndoLine comprende los siguientes pasos:

- *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 134 - SIDEXIS XG*]
- *Colocar EndoLines* [▶ *Página 136 - SIDEXIS XG*]
- *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 145 - SIDEXIS XG*]


27.1 VISTAS EN EL ASISTENTE DE ENDOLINE

En cada paso del asistente de EndoLine hay disponibles diferentes vistas.

Encontrará información general sobre la adaptación de las vistas en *Ajustar las vistas* [► *Página 68 - SI-DEXIS XG*] y *Adaptar la vista 3D* [► *Página 82 - SIDEXIS XG*].

PASO «ORIENTAR PREVIAMENTE LA REGIÓN DENTAL»

En el paso **Orientar previamente la región dental** están disponibles las siguientes vistas:

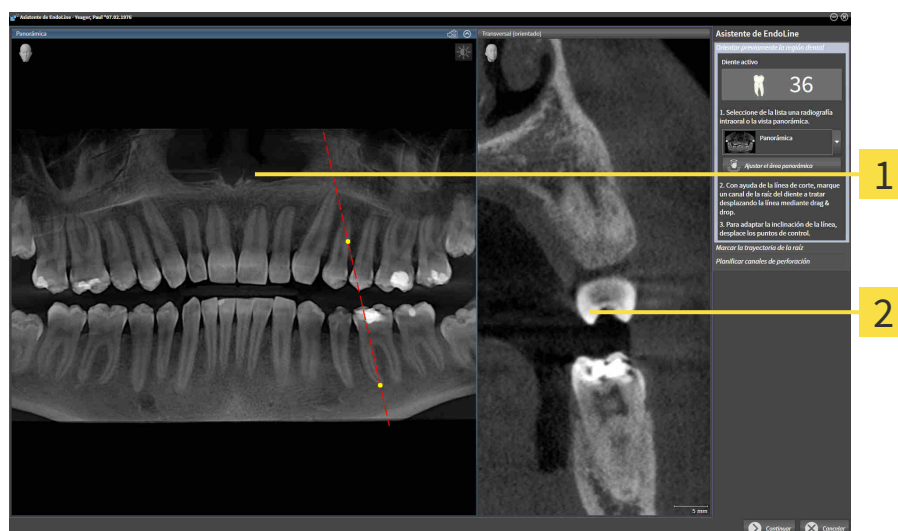

1 **Panorámica** Vista o vista **Radiografía intraoral**

2 Vista **Transversal (orientado)**

En la vista **Panorámica** o la vista **Radiografía intraoral** puede orientar previamente la vista del canal de la raíz a tratar con ayuda de una línea de corte. La vista **Radiografía intraoral** solo está disponible si ha registrado al menos una radiografía intraoral para el diente activo. Encontrará información para seleccionar un diente activo en *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [► *Página 133 - SI-DEXIS XG*].

En la vista **Transversal (orientado)** se muestra el diente marcado en la vista **Panorámica** o en la vista **Radiografía intraoral** desde el lateral y alineado con la línea de corte establecida.

PASO «COLOCAR ENDOLINES»

En el paso **Colocar EndoLines** están disponibles las siguientes vistas:



1 Vista **Transversal (orientado)**

2 Vista **Axial (orientado)**

3 **3D**Vista

4 Vista **EndoView (orientado)**

5 Vista **EndoView (orientado) 90°**

La vista **Transversal (orientado)** en el paso **Colocar EndoLines** se corresponde con la vista **Transversal (orientado)** del paso **Orientar previamente la región dental**. Muestra el diente marcado en el paso **Orientar previamente la región dental** en diagonal desde fuera hacia dentro y orientado a la línea de corte establecida.


La vista **Axial (orientado)** muestra desde arriba el diente orientado a la línea de corte establecida y marcado en el paso **Orientar previamente la región dental**.

La vista **3D** muestra el EndoLine en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].

La **EndoView (orientado)** es una vista alineada con el EndoLine que muestra el EndoLine seleccionado proyectado a un nivel 2D. El **EndoView (orientado) 90°** es el **EndoView (orientado)** girado en 90 grados. Las dos vistas solo se muestran una vez que haya colocado un EndoLine. Encontrará más información sobre EndoView en *EndoView* [▶ *Página 131 - SIDEXIS XG*].

PASO «PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN»

En el paso **Planificar canales de perforación** están disponibles las siguientes vistas:

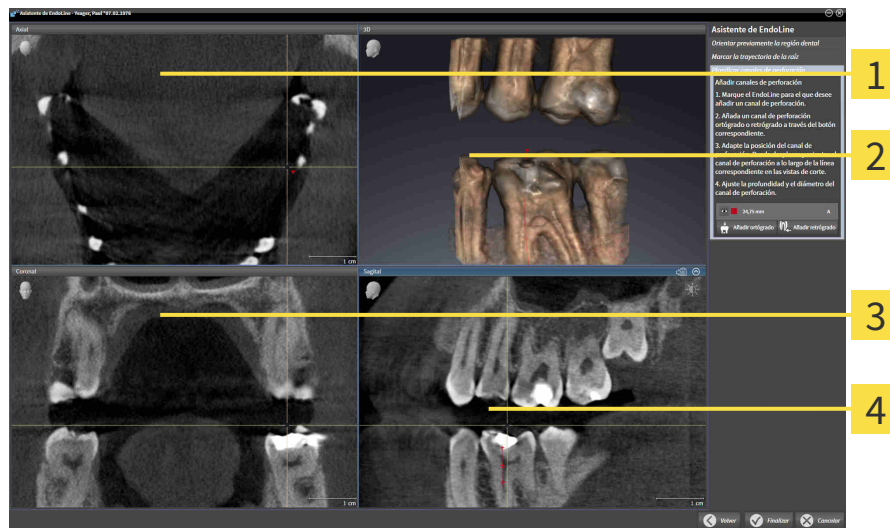

1 AxialVista

3 CoronalVista

2 3DVista

4 SagitalVista

La vista **Axial** muestra el EndoLine desde arriba.

La vista **3D** muestra el EndoLine en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 82 - SIDEXIS XG*].

La vista **Coronal** muestra el EndoLine desde delante.


La vista **Sagital** muestra el EndoLine desde la derecha.



Si aún no ha planificado ningún canal de perforación, SICAT Endo mostrará al abrir el corte **Planificar canales de perforación** en el asistente de EndoLine la vista **Axial**, la vista **3D**, la vista **Coronal** y la vista **Sagital**.

VISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE CANALES DE PERFORACIÓN ORTÓGRADOS

En la planificación de los canales de perforación ortógrados están disponibles las siguientes vistas:

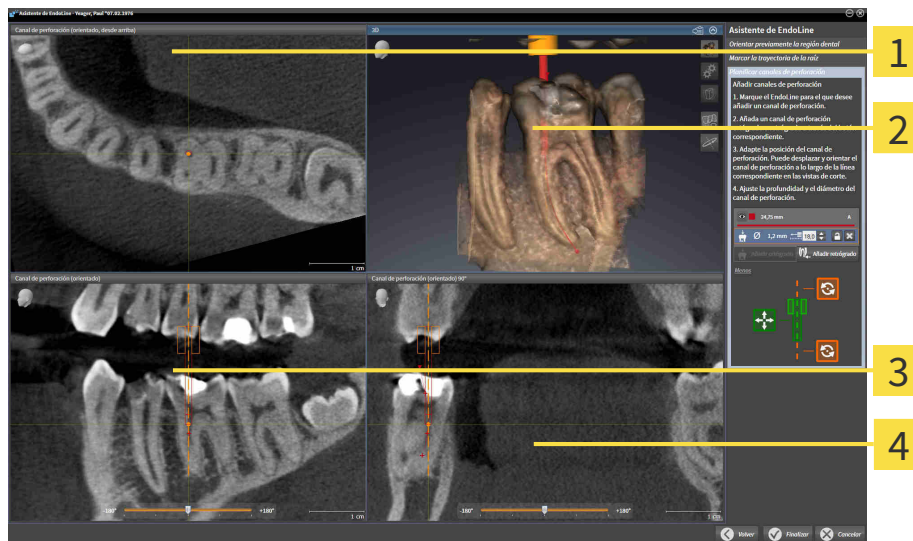

1 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

2 3DVista

3 Vista **Canal de perforación (orientado)**

4 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

La vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde arriba.


La vista **3D** muestra el canal de perforación establecido en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► [Página 82 - SIDEXIS XG](#)].

La vista **Canal de perforación (orientado)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde delante.

La vista **Canal de perforación (orientado) 90°** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde un lateral.

VISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE CANALES DE PERFORACIÓN RETRÓGRADOS

En la planificación de los canales de perforación retrógrados están disponibles las siguientes vistas:

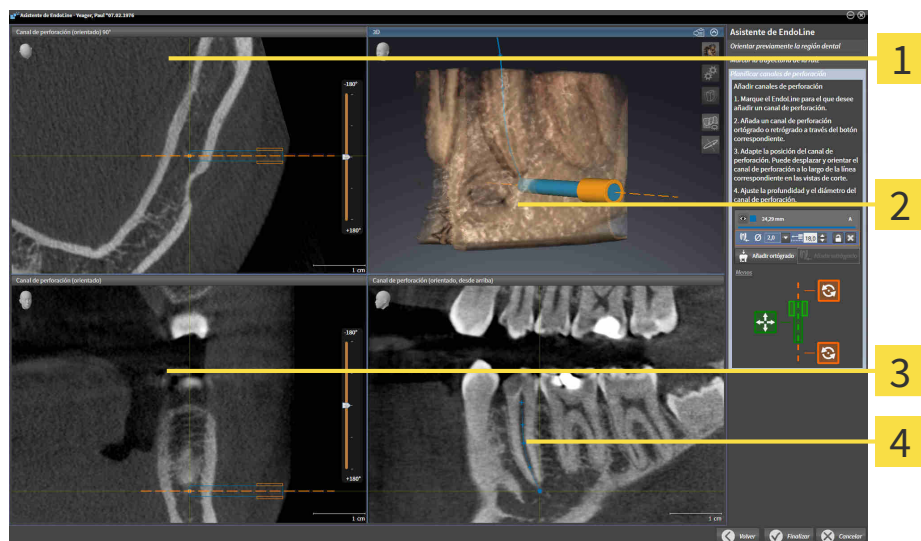

1 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

3 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 **3D**Vista

4 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

La vista **Canal de perforación (orientado) 90°** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde un lateral.


La vista **3D** muestra el canal de perforación establecido en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► [Página 82 - SIDEXIS XG](#)].

La vista **Canal de perforación (orientado)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde delante.

La vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde arriba.

27.1.1 ENDOVIEW

El software del EndoView de SICAT Endo visualiza la anatomía de las estructuras dentales complejas de un paciente proyectando y mostrando un EndoLine torcido de una radiografía 3D en un nivel 2D. Esta técnica se llama Curved Planar Reformation (CPR). Permite mostrar las estructuras torcidas desplegadas.

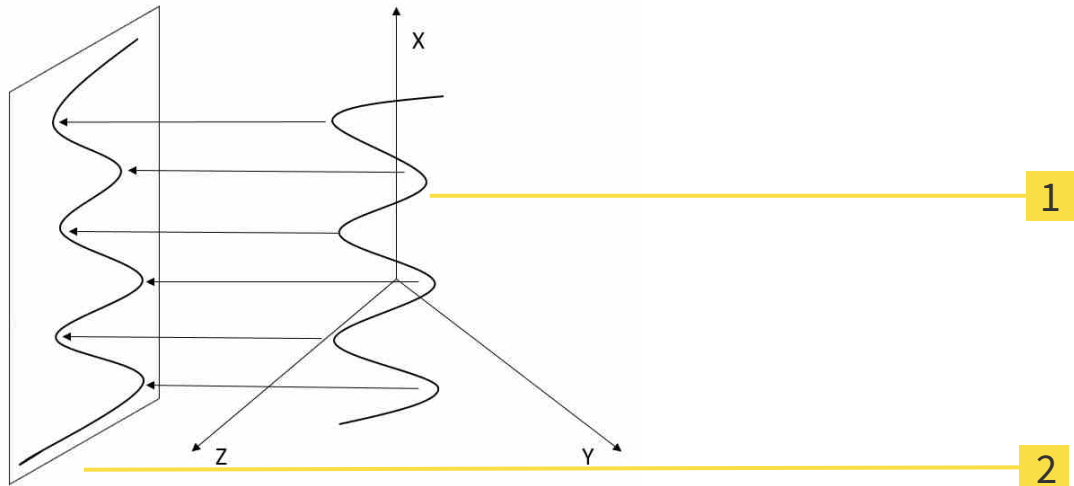

1 Radiografía 3D

2 Nivel 2D

Mediante la representación de un EndoLine en el nivel 2D, puede comprender las estructuras dentales anatómicas al detalle y detectar más fácilmente las anomalías. Al mismo tiempo, el EndoView ayuda a mejorar la precisión de las decisiones de diagnóstico y facilita la creación de un plan de tratamiento individual para el paciente.

27.1.2 GIRAR ENDOVIEW

Encontrará información general sobre el EndoView en *EndoView* [▶ *Página 131 - SIDEXIS XG*].

En las vistas **EndoView (orientado)** y **EndoView (orientado) 90°** puede utilizar una corredera para girar las secciones de las imágenes.

- ☑ El paso **Colocar EndoLines** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Colocar EndoLines* [▶ *Página 136 - SIDEXIS XG*].
- ☑ Ha establecido al menos un EndoLine.
- ☑ Ha seleccionado un EndoLine.

1. Active la vista **EndoView (orientado)** o la vista **EndoView (orientado) 90°** haciendo clic en la vista deseada.

▶ SICAT Endo activa la vista.



2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Desplace la corredera a la posición deseada.
5. Suelte el botón del ratón.

▶ SICAT Endo gira la sección de la imagen

▶ SICAT Endo adapta la vista **EndoView (orientado)** y la vista **EndoView (orientado) 90°**.



De manera alternativa, también puede girar la sección de la imagen haciendo clic en cualquier punto de **EndoView (orientado)** o de **EndoView (orientado) 90°** con el botón izquierdo del ratón y girar la sección de la imagen en la dirección deseada con el botón izquierdo del ratón pulsado.



El área de la corredera va de -180 grados a +180 grados y está dividida en pasos de 90 grados. Con ayuda de la corredera, puede ajustar un ángulo para el giro de la vista.

27.2 SELECCIONAR EL DIENTE PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO


Para poder planificar EndoLines y canales de perforación, deberá seleccionar el diente que desee tratar.

- ☑ Ha abierto el área de trabajo **Radiografía intraoral** o el área de trabajo **Panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 60 - SIDEXIS XG*].



1. En la **Barra de objetos**, mueva el puntero del ratón por el área **Diente activo**.

▶ Se abre la ventana **Número de diente**:

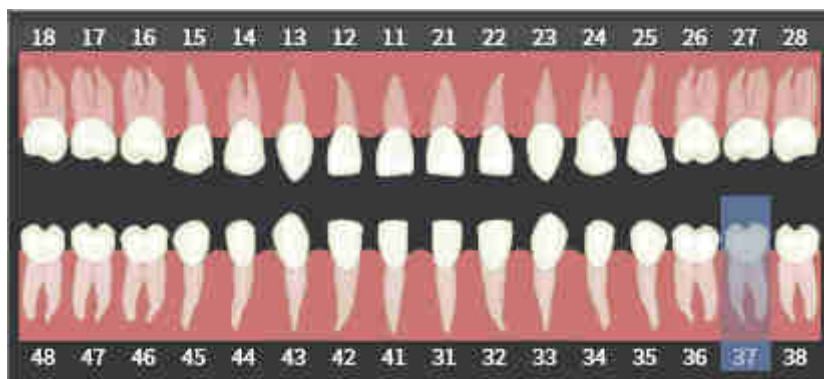

2. Mueva el puntero del ratón por encima del diente que desee tratar.
▶ SICAT Endo destaca el número de diente.
3. Para seleccionar el diente destacado, haga clic en el diente con el botón izquierdo del ratón.
▶ SICAT Endo marca el diente en azul.
▶ SICAT Endo Muestra el número de diente en la **Barra de objetos**, en el área **Diente activo**.
4. Para cerrar la ventana **Número de diente**, saque el puntero del ratón del área **Diente activo**.
▶ SICAT Endo cierra la ventana **Número de diente**.

27.3 ORIENTAR PREVIAMENTE LA REGIÓN DENTAL

Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 125 - SIDEXIS XG*].


En el paso **Orientar previamente la región dental**, con ayuda de una línea de corte puede adaptar las vistas de tal manera que pueda ver bien el diente y las raíces que desee tratar.

- ☑ En el área de trabajo **Radiografía intraoral** o en el área e trabajo **Panorámica**, ha seleccionado el diente que deseaba tratar mediante el esquema **Número de diente** en la **Barra de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [► *Página 133 - SIDEXIS XG*].
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 49 - SIDEXIS XG*].



1. Haga clic en el símbolo **Planificando el tratamiento de la raíz con ayuda de EndoLines y canales de perforación**.

► El paso **Orientar previamente la región dental** se abre:

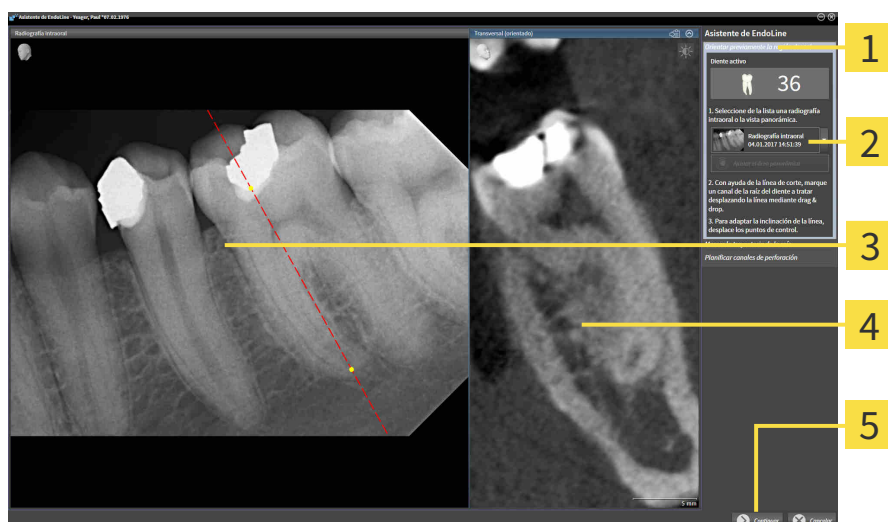

- | | |
|--|---|
| <p>1 Área Orientar previamente la región dental</p> <p>2 Lista con la vista Panorámica y radiografías intraorales</p> <p>3 Panorámica Vista o vista Radiografía intraoral</p> | <p>4 Vista Transversal (orientado)</p> <p>5 Botón Continuar</p> |
|--|---|

2. Seleccione de la lista una radiografía intraoral o la vista panorámica en el área **Orientar previamente la región dental**.

► SICAT Endo Muestra una línea de corte con dos puntos de control amarillos en la vista de la **radiografía intraoral** o en la vista **panorámica**.



3. Para desplazar la línea de corte, posicione el puntero del ratón en la línea de corte.
 - El puntero del ratón se transforma.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace la línea de corte a la posición deseada.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón.



- ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la línea de corte.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal (orientado)** a la posición cambiada de la línea de corte.
7. Para girar la línea de corte, posicione el puntero del ratón en uno de los dos puntos de control amarillos.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
 8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 9. Gire la línea de corte en la dirección deseada.
 10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual de la línea de corte.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal (orientado)** a la posición cambiada de la línea de corte.
 11. Haga clic en **Continuar**.
 - ▶ SICAT Endo lleva a cabo el ajuste de las vistas.
 - ▶ Se abre el paso **Colocar EndoLines**.

Continúe con *Colocar EndoLines* [▶ *Página 136 - SIDEXIS XG*].




Para que pueda elegir para la orientación previa entre una radiografía intraoral y la vista **Panorámica**, debe haber registrado al menos una radiografía intraoral para el diente seleccionado.



Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 95 - SIDEXIS XG*].

27.4 COLOCAR ENDOLINES



PRECAUCIÓN

El uso de la vista 3D para visualizar mediciones y objetos de planificación podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice la vista 3D únicamente de orientación y como fuente de información adicional.


Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [▶ *Página 125 - SIDEXIS XG*].

En el paso **Colocar EndoLines** puede marcar los canales de las raíces que desee tratar en las vistas orientadas con ayuda de los EndoLines.

SICAT Endo identifica el punto inicial y el punto final al añadir un EndoLine y marca el punto inicial con un triángulo y el punto final con un círculo.

El orden de los puntos depende del número de diente anteriormente seleccionado y la posición del diente en el maxilar del paciente. En el maxilar superior, el punto inicial se encuentra por debajo del punto final; en el maxilar inferior, el punto inicial se encuentra por encima del punto final.

- Ha finalizado el paso **Orientar previamente la región dental**. Encontrará información sobre ello en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 134 - SIDEXIS XG*].
- El paso **Colocar EndoLines** ya está abierto.

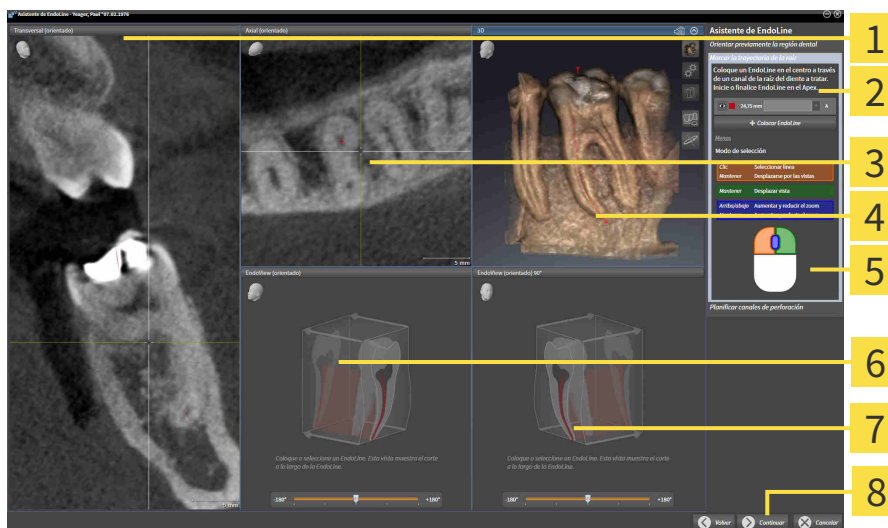

- | | |
|--|---|
| <p>1 Vista Transversal (orientado)</p> <p>2 Área Colocar EndoLines</p> <p>3 Vista Axial (orientado)</p> <p>4 3DVista</p> | <p>5 Infografía</p> <p>6 EndoView (orientado)</p> <p>7 EndoView (orientado) 90°</p> <p>8 Botón Continuar</p> |
|--|---|



1. Haga clic en el botón **Colocar EndoLine** del área **Colocar EndoLines**.
 - ▶ SICAT Endo destaca la vista **Transversal (orientado)** y la vista **Axial (orientado)**.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal (orientado)** o en la vista **Axial (orientado)**.

3. Haga clic en el Apex o en el punto inicial con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo establece un punto de control.
4. Añada más puntos de control para marcar la trayectoria de la raíz haciendo clic en más puntos a lo largo de la trayectoria del canal de la raíz con el botón izquierdo del ratón.
5. Para finalizar el marcado del canal de la raíz, haga doble clic en el Apex o en el punto inicial.
 - ▶ SICAT Endo establece un punto de control.
 - ▶ SICAT Endo muestra todos los puntos de control así como una conexión entre los puntos en forma de EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo orienta la vista **EndoView (orientado)** y la vista **EndoView (orientado) 90°** al EndoLine.
6. En caso necesario, repita los pasos para marcar más canales de la raíz.
7. Compruebe los EndoLines colocados en la vista **EndoView (orientado)** o en la vista **EndoView (orientado) 90°**.
8. Haga clic en **Continuar**.

▶ El paso **Planificar canales de perforación** se abre.

Continúe con *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 145 - SIDEXIS XG*].

Puede editar el color y el texto para la descripción y la posición de un EndoLine. Encontrará información sobre ello en *Ajustar color y texto* [▶ *Página 138 - SIDEXIS XG*].

Puede editar un EndoLine desplazando, añadiendo o borrando puntos de control. Encontrará información sobre ello en *Añadir, desplazar y borrar puntos de control* [▶ *Página 139 - SIDEXIS XG*].

Puede utilizar un modo de rotación en la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Girar la vista 3D* [▶ *Página 142 - SIDEXIS XG*].

Puede visualizar impresiones ópticas importadas y registradas en la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Mostrar impresiones ópticas en la vista 3D* [▶ *Página 143 - SIDEXIS XG*].

Puede utilizar diferentes funciones para añadir un EndoLine con ayuda de los botones del ratón. Encontrará información sobre ello en *Utilizar botón del ratón* [▶ *Página 144 - SIDEXIS XG*].



Para seleccionar un EndoLine, puede hacer clic en la línea con el botón izquierdo del ratón en una de las vistas alineadas o seleccionar en el área **Colocar EndoLines**.



Para borrar un EndoLine, marque el EndoLine en el área **Colocar EndoLines** y haga clic en el botón **Borrar EndoLine** al final de la línea del EndoLine seleccionado.



Para adaptar la representación en el **EndoView (orientado)** o en el **EndoView (orientado) 90°**, puede utilizar la corredera en estas vistas. Con ayuda de la corredera, puede girar las vistas a la izquierda o a la derecha en el ángulo que desee.

27.5 AJUSTAR COLOR Y TEXTO

AJUSTAR COLOR

Para modificar el color de un EndoLine, haga lo siguiente:

1. En la línea del EndoLine, haga clic en el botón **Cambiar de color**.
 - ▶ SICAT Endo cambia el color del EndoLine.
2. Si el color no es el deseado, vuelva a hacer clic en el botón **Cambiar de color** hasta que SICAT Endo muestre el color deseado.
 - ▶ SICAT Endo muestra el nuevo color del EndoLine.

AJUSTAR TEXTO PARA LA DESCRIPCIÓN O LA INDICACIÓN DE LA POSICIÓN

Para modificar el texto para la descripción o para la indicación de la posición del EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Para introducir una descripción para el EndoLine, haga clic en el campo **Descripción/posición** en la línea del EndoLine.
 - ▶ El puntero del ratón parpadea en la posición de entrada.
2. Indique la descripción deseada para el EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo muestra la descripción .
3. Para seleccionar un texto para la indicación de la posición del EndoLine, haga clic en el símbolo de la flecha en el campo **Descripción/posición** en la línea del EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo muestra una lista con indicaciones de posiciones.
4. Haga clic en la indicación de la posición deseada en la lista.
 - ▶ SICAT Endo muestra la indicación de la posición en el campo **Descripción/posición**.
5. Para aceptar los cambios y cerrar el campo **Descripción/posición**, haga clic con el botón izquierdo del ratón en un punto fuera del campo **Descripción/posición**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva descripción o indicación de la posición.




27.6 AÑADIR, DESPLAZAR Y BORRAR PUNTOS DE CONTROL

AÑADIR PUNTOS DE CONTROL A UN ENDOLINE

Para añadir un punto de control a un EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Posicione el puntero del ratón en el punto del EndoLine en el que desee añadir un punto de control.

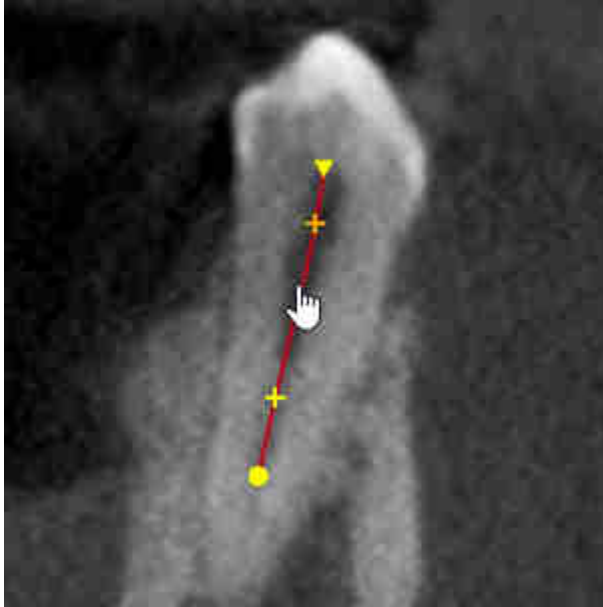


- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Haga doble clic en el punto.
- ▶ SICAT Endo añade un punto de control en forma de cruz.

DESPLAZAR PUNTOS DE CONTROL DE UN ENDOLINE

Para desplazar puntos de control de un EndoLine, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón en el punto de control del EndoLine que desee desplazar.

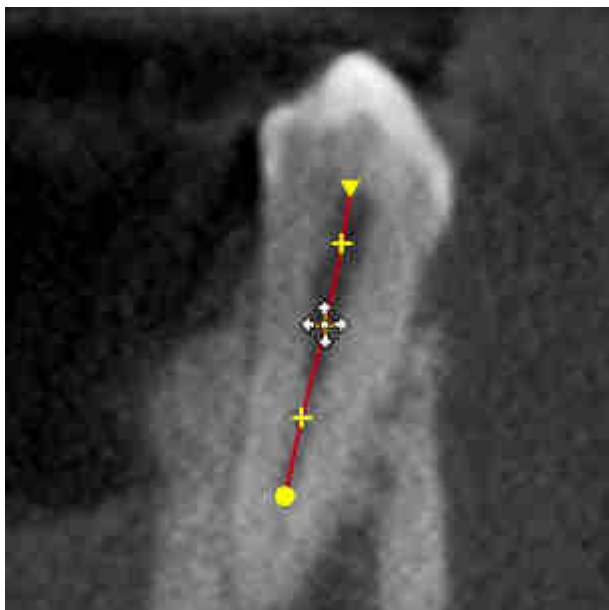


- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ El punto de control sigue el movimiento del ratón.
 - ▶ SICAT Endo adapta el EndoLine de acuerdo a la nueva posición del punto de control.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del punto de control.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva trayectoria del EndoLine.

BORRAR PUNTOS DE CONTROL DE UN ENDOLINE

Para borrar un punto de control de un EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Sitúe el puntero del ratón en el punto de control del EndoLine que desee borrar.

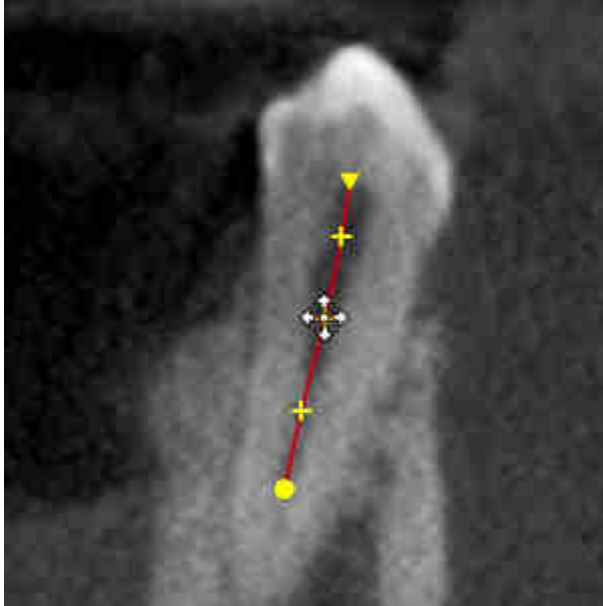

- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Haga clic en el punto de control con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo marca el punto de control.
 3. Pulse la tecla **Supr**.
 - ▶ SICAT Endo borra el punto de control.
 - ▶ SICAT Endo ajusta en correspondencia el punto de control.



Recuerde que el EndoLine se borrará por completo tan pronto como borre el penúltimo punto de control.

27.7 GIRAR LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].

Con la función **Girar la vista 3D** puede conectar y desconectar un modo de rotación para la radiografía 3D en el asistente de EndoLine. Si está conectado el modo de rotación, SICAT Endo gira la radiografía 3D en el sentido de las agujas del reloj.

Para utilizar el modo de rotación, haga lo siguiente:

Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [▶ *Página 67 - SIDEXIS XG*].

1. Ajuste la representación de la radiografía 3D de tal manera que se muestre la sección de la imagen deseada.
2. Asegúrese de haber seleccionado el tipo de representación deseado. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 84 - SIDEXIS XG*].
3. Asegúrese de seleccionar el modo de sección deseado. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [▶ *Página 87 - SIDEXIS XG*].



4. Haga clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - ▶ SICAT Endo gira la radiografía 3D en torno al eje vertical de la sección seleccionada.
5. Para finalizar el modo de rotación, vuelva a hacer clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - ▶ SICAT Endo finaliza el giro de la radiografía 3D.



Para finalizar el modo de rotación, también puede hacer clic en el punto que desee dentro de la vista **3D**.

27.8 MOSTRAR IMPRESIONES ÓPTICAS EN LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 82 - SIDEXIS XG*].

Si ya ha importado y registrado impresiones ópticas, puede mostrar y ocultar las impresiones ópticas en el asistente de EndoLine en la vista **3D**.

Para mostrar u ocultar las impresiones ópticas, proceda de la siguiente manera:

- ✓ Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [▶ *Página 67 - SIDEXIS XG*].
- ✓ Ya ha importado y registrado al menos una impresión óptica. Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 99 - SIDEXIS XG*].



1. Para mostrar las impresiones ópticas, haga clic en el botón **Mostrar objeto**.

- ▶ SICAT Endo muestra las impresiones ópticas.
- ▶ SICAT Endo actualiza la representación de la radiografía 3D.



2. Para ocultar las impresiones ópticas, haga clic en el botón **Ocultar objeto**.


- ▶ SICAT Endo oculta las impresiones ópticas.
- ▶ SICAT Endo actualiza la representación de la radiografía 3D.



Si aún no ha importado y registrado ninguna impresión óptica, SICAT Endo no muestra el botón **Mostrar objeto** en la vista **3D**.

27.9 UTILIZAR BOTÓN DEL RATÓN

SICAT Endo muestra un gráfico que explica cómo deben utilizarse los botones del ratón a la hora de establecer un EndoLine:

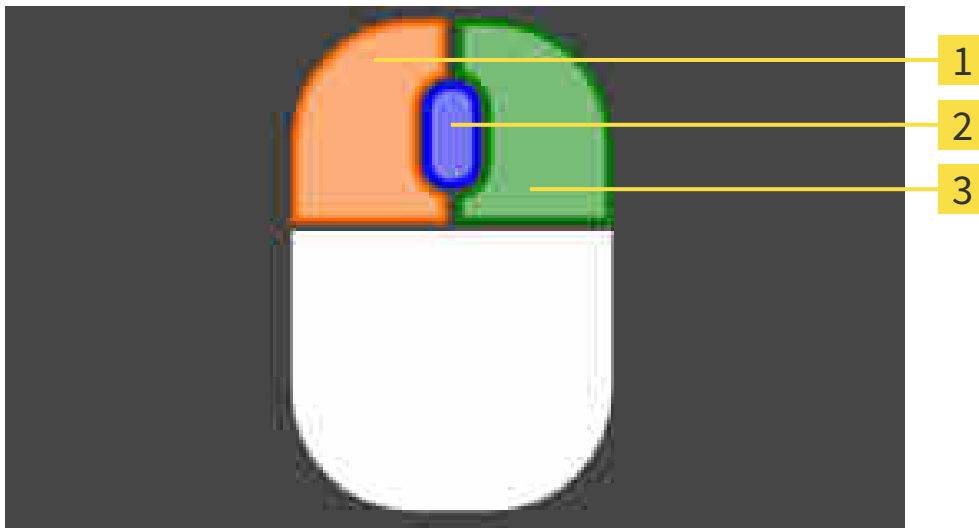

1 Botón izquierdo del ratón

3 Botón derecho del ratón

2 Rueda del ratón

Si activa un botón del ratón, SICAT Endo lo destaca en el gráfico. La acción enlazada a un botón del ratón depende del modo de edición.

SICAT Endo diferencia entre los siguientes modos de edición:

- Crear
- Editar
- Seleccionar

Dependiendo del modo de edición, tendrá disponibles diferentes acciones. Las acciones disponibles se muestran por encima del gráfico en forma de tabla y aparecen siempre con el color del botón del ratón correspondiente.

Puede ocultar y mostrar el gráfico según lo que necesite.

27.10 PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN



PRECAUCIÓN

Una profundidad de perforación incorrecta puede conllevar un tratamiento incorrecto.

Asegúrese de que la profundidad de perforación y el taladro seleccionado coincidan.


Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 125 - SIDEXIS XG*].

En el paso **Planificar canales de perforación** puede añadir o editar canales de perforación ortógrados y retrógrados a los EndoLines. Puede añadir un canal de perforación ortógrado y un canal de perforación retrógrado por cada EndoLine. Un canal de perforación tiene siempre el mismo color que el EndoLine que pertenece al canal de perforación

ABRIR EL PASO «PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN»

- Ha finalizado el paso **Colocar EndoLines**. Encontrará información sobre ello en *Colocar EndoLines* [► *Página 136 - SIDEXIS XG*].
- El paso **Colocar EndoLines** está abierto.
 - En el paso **Colocar EndoLines**, haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Planificar canales de perforación** se abre:

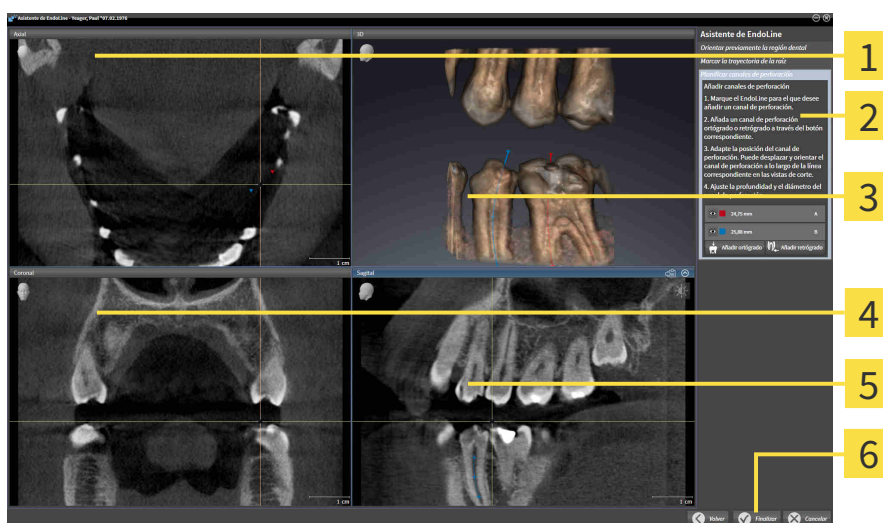

1 AxialVista

4 CoronalVista

2 Área Añadir canales de perforación

5 SagitalVista

3 3DVista

6 Botón Finalizar

PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN ORTÓGRADOS

1. En el área **Añadir canales de perforación**, seleccione el EndoLine al que desee añadir un canal de perforación ortógrado.


► SICAT Endo marca el EndoLine



2. Haga clic en el botón **Añadir ortógrado**.

► SICAT Endo añade un canal de perforación ortógrado al EndoLine marcado.

► SICAT Endo adapta las vistas de la siguiente manera:

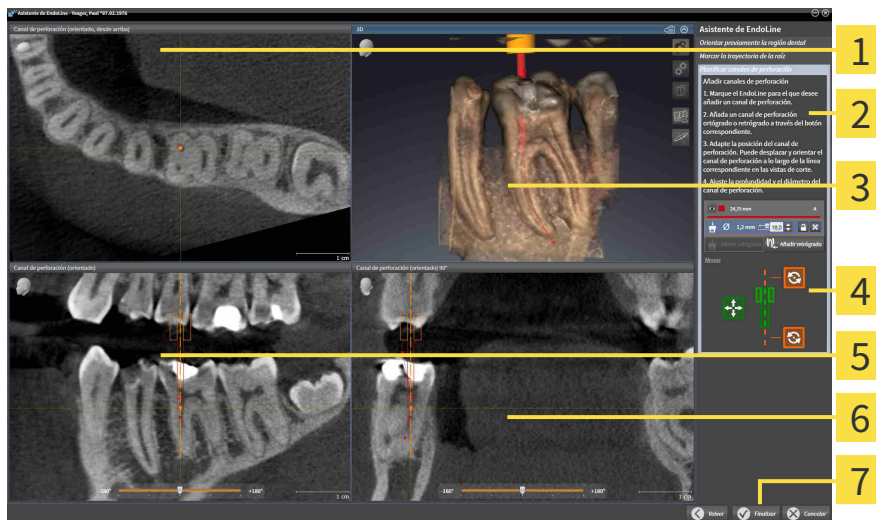

1 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

5 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 Área **Añadir canales de perforación**

6 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

3 **3D**Vista

7 Botón **Finalizar**

4 Infografía



3. Para adaptar la posición del canal de perforación a lo largo del EndoLine, sitúe el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** sobre el canal de perforación.

► El puntero del ratón se transforma.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

5. Desplace el canal de perforación a la posición deseada.

6. Suelte el botón izquierdo del ratón.


► SICAT Endo mantiene la posición actual del canal de perforación.

► SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



7. Para adaptar el giro del canal de perforación, posicione el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** fuera del canal de perforación en el EndoLine.

► El puntero del ratón se transforma.

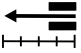8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
9. Gire el EndoLine con el canal de perforación en la dirección deseada.
10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual del EndoLine y del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.
-  11. En caso necesario, puede adaptar la posición del casquillo de perforación haciendo clic en las teclas de flechas detrás del campo **Profundidad [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva profundidad del casquillo de perforación.
12. Para finalizar la planificación de los canales de perforación, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente de EndoLine.
 - ▶ Se abre el área de trabajo **Radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra los canales de perforación planificados.

PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN RETRÓGRADOS

1. En el área **Añadir canales de perforación**, seleccione el EndoLine al que desee añadir un canal de perforación retrógrado.


► SICAT Endo marca el EndoLine



2. Haga clic en el botón **Añadir retrógrado**.

► SICAT Endo añade un canal de perforación retrógrado al EndoLine marcado.

► SICAT Endo adapta las vistas de la siguiente manera:

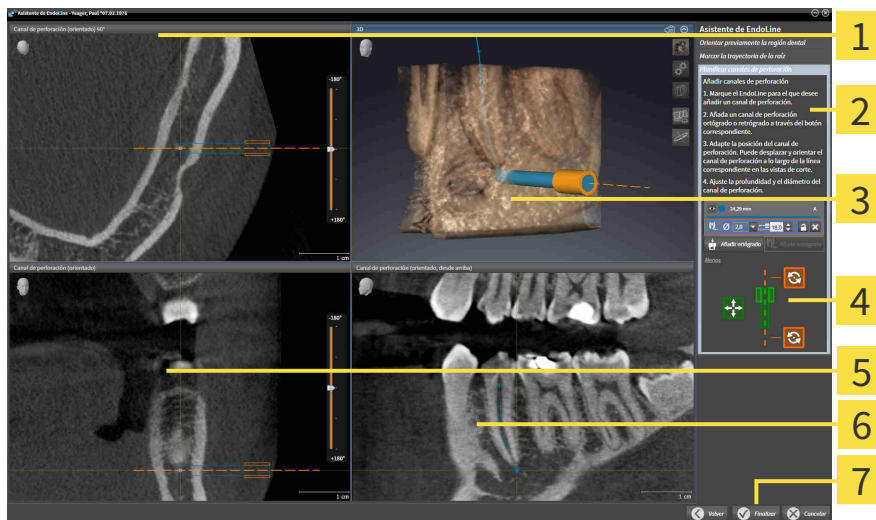

1 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

5 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 Área **Añadir canales de perforación**

6 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

3 **3D**Vista

7 Botón **Finalizar**

4 Infografía



3. Para adaptar la posición del canal de perforación a lo largo del EndoLine, sitúe el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** sobre el canal de perforación.

► El puntero del ratón se transforma.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

5. Desplace el canal de perforación a la posición deseada.

6. Suelte el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Endo mantiene la posición actual del canal de perforación.

► SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



7. Para adaptar el giro del canal de perforación, posicione el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** fuera del canal de perforación en el EndoLine.

► El puntero del ratón se transforma.

8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
9. Gire el EndoLine con el canal de perforación en la dirección deseada.
10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual del EndoLine y del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



11. En caso necesario, puede adaptar la posición del casquillo de perforación haciendo clic en las teclas de flechas detrás del campo **Profundidad [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva profundidad del casquillo de perforación.



12. En caso necesario, puede adaptar el diámetro del canal de perforación retrógrado haciendo clic en el símbolo de la flecha detrás del campo **Diámetro [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra una lista de diámetros disponibles.

13. Haga clic en el diámetro deseado.
 - ▶ SICAT Endo muestra el nuevo diámetro del canal de perforación.

14. Para finalizar la planificación de los canales de perforación, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente de EndoLine.
 - ▶ Se abre el área de trabajo **Radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra los canales de perforación planificados.

BLOQUEAR CANALES DE PERFORACIÓN

Utilice esta función para proteger los canales de perforación de los cambios.

Para bloquear un canal de perforación, haga lo siguiente:

- El canal de perforación ya está marcado.



- Haga clic en el símbolo **Bloquear objeto**.
 - ▶ SICAT Endo bloquea el canal de perforación para su edición.
 - ▶ SICAT Endo bloquea el EndoLine correspondiente.

DESBLOQUEAR CANALES DE PERFORACIÓN

Para desbloquear un canal de perforación, haga lo siguiente:

- El canal de perforación está bloqueado.
- El canal de perforación ya está activado.



- Haga clic en el símbolo **Desbloquear objeto**.
 - ▶ SICAT Endo desbloquea el canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo desbloquea el EndoLine correspondiente.

ELIMINAR CANALES DE PERFORACIÓN

Para eliminar un canal de perforación, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el área **Añadir canales de perforación** en el objeto planificado Endo que contenga el canal de perforación que desee borrar.
 - ▶ SICAT Endo marca el objeto planificado Endo.
2. Haga clic en el objeto planificado Endo en el canal de perforación que desee borrar.
 - ▶ SICAT Endo marca el canal de perforación.
3. Al final de la línea, haga clic en el botón **Eliminar canal de perforación**.
 - ▶ SICAT Endo elimina el canal de perforación.



Si ha bloqueado un canal de perforación para su edición, tampoco podrá editar el EndoLine correspondiente. Para poder editar el EndoLine, deberá desbloquear el canal de perforación correspondiente.

28 MEDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁNGULOS

Existen dos tipos de mediciones diferentes en SICAT Endo:



- Mediciones de distancias




- Mediciones de ángulos

Las herramientas para añadir mediciones se encuentran en el paso **Diagnosticar** de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Puede añadir mediciones en todas las vistas de corte 2D. Cada vez que añade una medición, SICAT Endo la añade también al grupo **Mediciones** en el **Navegador de objetos**.

Para las mediciones están disponibles las siguientes acciones:

- *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 152 - SIDEXIS XG*]
- *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 153 - SIDEXIS XG*]
- *Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas* [▶ *Página 155 - SIDEXIS XG*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: encontrará información sobre ello en Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*].
- *Enfocar mediciones, eliminar mediciones y deshacer y rehacer acciones de medición: encontrará más información al respecto en Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 55 - SIDEXIS XG*].

28.1 AÑADIR MEDICIONES DE DISTANCIAS

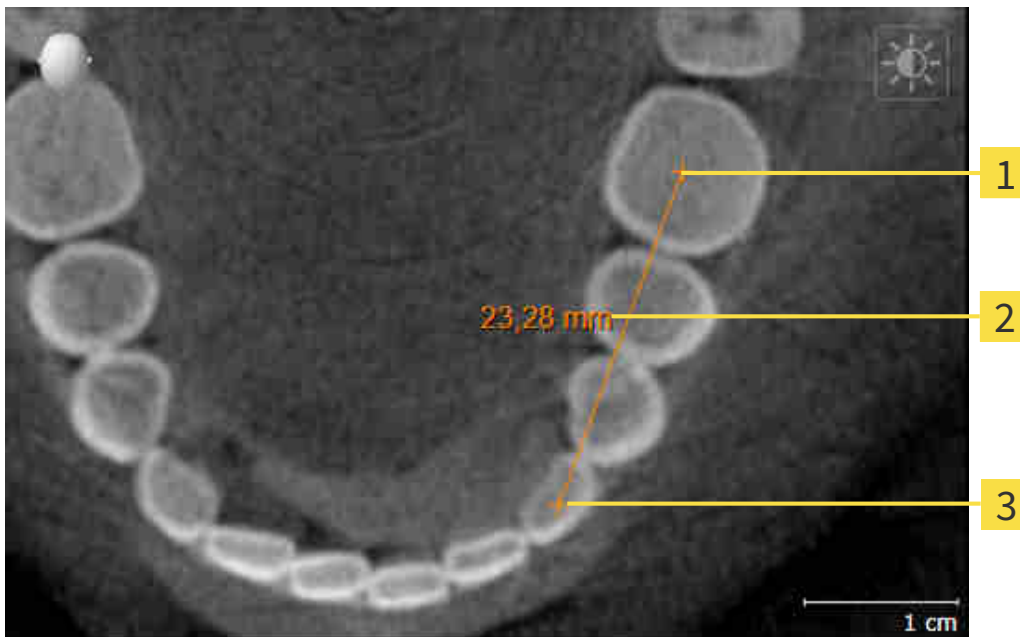

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

Para añadir una medición de distancia, haga lo siguiente:

El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.




1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de distancias (D)**.
 - ▶ SICAT Endo añade una nueva medición de distancia al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de distancias.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra una línea de distancia entre el punto de inicio y el puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra la distancia actual entre el punto de inicio y el puntero del ratón en el centro de la línea de distancia y en el **Navegador de objetos**.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final de la medición de distancias y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

28.2 AÑADIR MEDICIONES DE ÁNGULOS

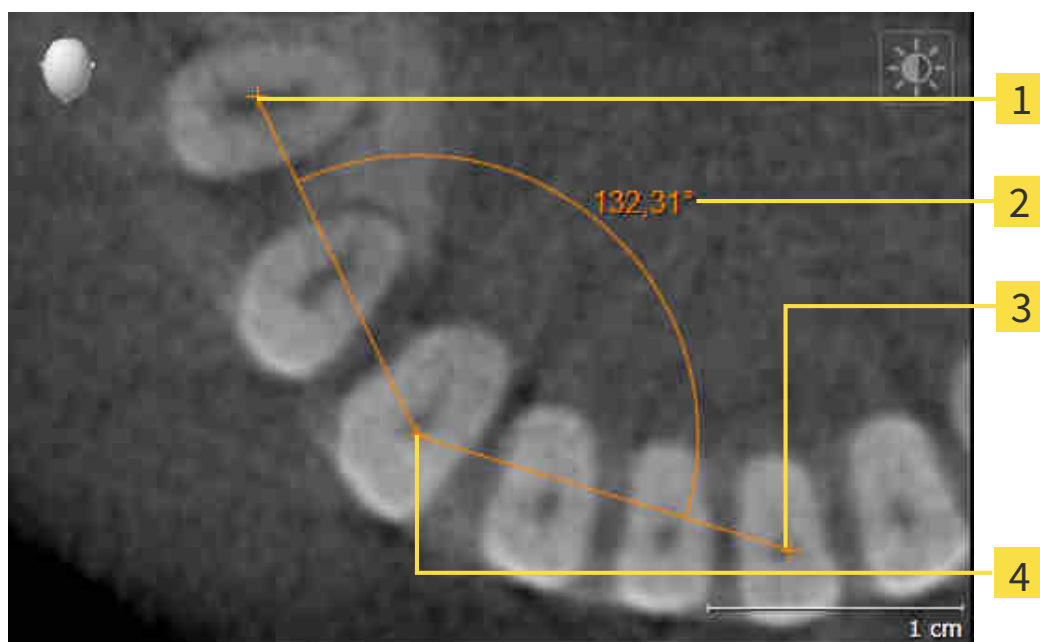

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

4 Punto más alto

Para añadir una medición de ángulo, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.



1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de ángulo (A)**.
 - ▶ SICAT Endo añade una nueva medición de ángulo al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de ángulos.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra el primer lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el punto de inicio hasta el puntero del ratón.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto más alto de la medición de ángulos y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo indica el vértice mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra el segundo lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el vértice hasta el puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el ángulo actual entre los dos lados de la medición y en el **Navegador de objetos**.

5. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final del segundo lado y haga clic con el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Endo indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

28.3 DESPLAZAR MEDICIONES, PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES Y LECTURAS

DESPLAZAR MEDICIONES

Para desplazar una medición, haga lo siguiente:

SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 55 - SIDEXIS XG*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre una línea de la medición.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la medición.
 - ▶ La medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la medición.

DESPLAZAR PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES

Para desplazar un punto de medición individual, haga lo siguiente:

SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 55 - SIDEXIS XG*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el punto de medición que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada del punto de medición.
 - ▶ El punto de medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ La lectura cambia mientras desplaza el ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la lectura.

DESPLAZAR LECTURAS

Para desplazar una lectura, haga lo siguiente:

☑ SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 53 - SIDEXIS XG*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 55 - SIDEXIS XG*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la lectura que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la lectura.
 - ▶ La lectura sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra una línea de puntos entre la lectura y la respectiva medición.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la lectura.



Tras haber desplazado el usuario el valor de una medición, SICAT Endo determina el valor de una posición absoluta. Para que el valor vuelva a ser relativo a la medición, haga doble clic en el valor.

29 INFORMAR AL PACIENTE



PRECAUCIÓN

Utilizar el impreso con fines de diagnóstico podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice exclusivamente las funciones de visualización de imágenes médicas de la interfaz de usuario del software para realizar un diagnóstico y planificar el tratamiento.

Con imágenes específicas de un paciente puede explicar a ese paciente su diagnóstico y aclarar el tratamiento. La explicación al paciente tiene lugar en dos pasos:

1. En su consulta en SICAT Endo
2. A través de una información del paciente mediante impreso.

El contenido de los impresos puede redactarse en pantalla durante las explicaciones.

Las fuentes son imágenes y capturas de pantalla basadas en objetos de dibujo.

Gracias al impreso, el paciente puede entender mejor los resultados y luego comentarlos con otras personas.

La creación de impresos consta de los siguientes pasos:

- *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 158 - SIDEXIS XG*]
- *Preparar impresos* [▶ *Página 162 - SIDEXIS XG*]
- *Generar impresos* [▶ *Página 164 - SIDEXIS XG*]

29.1 CREAR IMÁGENES Y CAPTURAS DE PANTALLA

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [► *Página 157 - SIDEXIS XG*].

Encontrará información general sobre la manera de administrar imágenes y capturas de pantalla en *Objetos de SICAT Endo* [► *Página 56 - SIDEXIS XG*].

Existen dos herramientas de dibujo:

- **Dibujar flecha**
- **Dibujar círculo**

DIBUJAR FLECHAS

Para dibujar una flecha, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha orientado el volumen de acuerdo con sus requisitos. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [► *Página 90 - SIDEXIS XG*].
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.

1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar la punta de la flecha y mantenga el botón pulsado.
4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra una flecha en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el extremo de la flecha coincide con la posición del puntero del ratón.
5. Sitúe el puntero del ratón en la posición deseada para el extremo de la flecha y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra la flecha terminada en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
6. Haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
 - ▶ SICAT Endo sale del modo de dibujar flechas.

DIBUJAR CÍRCULOS

Para dibujar un círculo, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha alineado el volumen en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 90 - SIDEXIS XG*].
 - ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.
1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
 2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
 3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar el centro del círculo y mantenga el botón pulsado.
 4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra un círculo en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el radio del círculo coincide con la distancia entre el centro y la posición del puntero del ratón.
 5. Mueva el puntero hasta alcanzar el radio deseado y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el círculo terminado en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 6. Haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
 - ▶ SICAT Endo sale del modo de dibujar círculos.



Mientras la herramienta de dibujo **Dibujar flecha** o la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** está activa, puede crear varios objetos de dibujo consecutivamente. Para cancelar el uso de una herramienta de dibujo, haga clic en un punto fuera de la vista en cuestión o pulse la tecla **ESC**.

AJUSTAR HERRAMIENTAS DE DIBUJO

La herramienta de dibujo **Dibujar flecha** y la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** pueden ajustarse por separado. Los cambios en los ajustes afectan solo a los objetos de dibujo creados posteriormente.


Para ajustar una herramienta de dibujo, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Ajustar herramienta de dibujo** junto al símbolo **Dibujar flecha** o junto al símbolo **Dibujar círculo**, según corresponda.

▶ Se abre la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**:

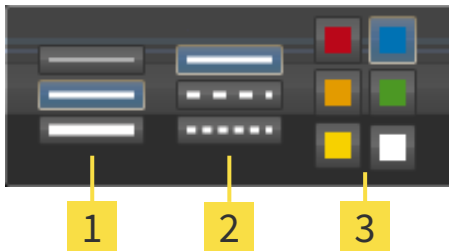

1 Símbolos para el **Grosor de línea**

2 Símbolos para el **Tipo de línea**

3 Símbolos para el **Color de línea**

2. Haga clic en los símbolos que desee para ajustar el **Grosor de línea**, el **Tipo de línea** y el **Color de línea** de la herramienta de dibujo.
3. Haga clic en un punto cualquiera fuera de la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.
 - ▶ SICAT Endo cierra la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.
 - ▶ SICAT Endo guarda los ajustes en su perfil de usuario.
 - ▶ SICAT Endo aplica los nuevos ajustes a los objetos de dibujo creados desde ahora.

AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA A LA VENTANA "CREAR IMPRESO"

Puede crear capturas de pantalla de todas las vistas, en todas las áreas de trabajo y en todas las ventanas, siempre y cuando la vista incluya el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

Para añadir capturas de pantalla al impreso, haga lo siguiente:



1. Para hacer una captura de pantalla de una vista, haga clic en la **Barra de herramientas de la vista** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
 2. Para hacer una captura de pantalla de toda el área de trabajo, haga clic en la **Barra de herramientas del área de trabajo** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
- ▶ SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen de pantalla** en el **Navegador de objetos** y activa el objeto.
 - ▶ La captura de pantalla está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 - ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla en el portapapeles de Windows.

Continúe con *Preparar impresos* [▶ *Página 162 - SIDEXIS XG*].

29.2 PREPARAR IMPRESOS

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [► *Página 157 - SIDEXIS XG*].

Para preparar impresos, están disponibles las siguientes acciones:

- Abrir la ventana **Creación del informe**
- Modificar ajustes de impresos
- Preparar elementos

ABRIR LA VENTANA "CREACIÓN DEL INFORME"

- ☑ Ha creado al menos un objeto **Imagen** o un objeto **Imagen de pantalla**.
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



- Haga clic en el símbolo **Crear impreso de información al paciente**.
- ▶ Se abre la ventana **Creación del informe**:

MODIFICAR AJUSTES DE IMPRESOS

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.
1. Haga clic en el símbolo para la disposición deseada de las imágenes en el área **Ajustes de la galería de imágenes**:
 - ▶ SICAT Endo muestra las imágenes de acuerdo con el ajuste deseado.
 2. En el área **Ajustes globales**, haga clic en el botón con el tamaño del papel que desee.
 - ▶ SICAT Endo modifica el tamaño del papel de acuerdo con el ajuste deseado.
 3. Active o desactive la casilla de comprobación **Anonimizar información del paciente**.
 - ▶ SICAT Endo muestra en el impreso la información real del paciente o la información anonimizada del paciente de acuerdo con el ajuste seleccionado.

PREPARAR ELEMENTOS PARA IMPRESOS

La ventana **Creación del informe** muestra capturas de pantalla de objetos **Imagen** y capturas de pantalla de objetos **Imagen de pantalla**. Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [► *Página 158 - SIDEXIS XG*].

Si desea preparar elementos para impresos, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.



1. Si desea ocultar un elemento en el impreso, desactive la casilla de comprobación del elemento.
 - ▶ SICAT Endo oculta el elemento en el impreso.



2. Si desea que SICAT Endo muestre una sola imagen en una página, haga clic en el símbolo **Mostrar imagen en una sola página**.



3. Si desea añadir una descripción a un elemento, haga clic en el símbolo **Editar la descripción de imagen** del elemento.
 - ▶ SICAT Endo muestra una versión ampliada del elemento y un campo de texto:
4. Introduzca un texto en el campo de texto.
 - ▶ Si el texto introducido es parte de un módulo de texto existente, SICAT Endo muestra la lista de módulos de texto.
5. Haga clic en el módulo de texto deseado.
 - ▶ SICAT Endo añade el módulo de texto en el campo de texto.
6. Si el texto deseado no existe como módulo de texto, introduzca un texto nuevo.
7. Haga clic en el botón **OK**.
 - ▶ SICAT Endo guarda el texto como descripción de la captura de pantalla.
 - ▶ Si el texto introducido no existe como módulo de texto, SICAT Endo guarda la descripción como nuevo módulo de texto en su perfil de usuario.
8. Si desea modificar el orden de los elementos en el impreso, hágalo mediante arrastrar y soltar.



Al situar el puntero del ratón sobre un módulo de texto, SICAT Endo muestra el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**. Si hace clic en el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**, SICAT Endo elimina el módulo de texto de su perfil de usuario.



En la ventana que muestra las versiones ampliadas de los elementos puede cambiar entre los elementos haciendo clic en el botón **Siguiente elemento** y el botón **Elemento anterior**.

Puede eliminar por completo elementos del impreso por medio del **Navegador de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 55 - SIDEXIS XG*].

Continúe con *Generar impresos* [▶ *Página 164 - SIDEXIS XG*].



SICAT Endo utiliza el logotipo de la consulta y el texto informativo de la consulta que se hayan configurado en los ajustes generales. Encontrará más información al respecto en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 188 - SIDEXIS XG*].

29.3 GENERAR IMPRESOS

Para producir un impreso, están disponibles las siguientes acciones:

- Guardar impreso como archivo PDF
- Imprimir impreso

GUARDAR IMPRESO COMO ARCHIVO PDF

La ventana **Creación del informe** ya está abierta:



1. En el área **Edición**, haga clic en el botón **Exportación de PDF**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
2. Vaya hasta el directorio donde quiera guardar el impreso.
3. Escriba un nombre en el campo **Nombre del archivo** y haga clic en **Guardar**.
 - ▶ La ventana del explorador de archivos de Windows se cierra.
 - ▶ SICAT Endo guarda el impreso como archivo PDF.

IMPRIMIR IMPRESO



Para que los impresos tengan una calidad adecuada, se necesita una impresora que cumpla determinados requisitos. Encontrará más información al respecto en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 8 - SIDEXIS XG*].



- La ventana **Creación del informe** ya está abierta.
1. Haga clic en el botón **Imprimir**.
 - ▶ Se abre la ventana **Drucken**.
 2. Seleccione la impresora que desee y modifique los ajustes de la impresora si es necesario.
 3. Haga clic en **Drucken**.
 - ▶ SICAT Endo envía el impreso a la impresora.

30 EXPORTACIÓN DE DATOS

Puede exportar datos.

Puede exportar los datos de paciente y los datos de volumen abiertos actualmente.

Se trata del estudio que se ha abierto desde SIDEXIS XG.

NOTA

Reimportación de datos exportados

Los datos que se hayan exportado previamente desde SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG solamente se pueden importar a la versión independiente de SICAT Suite.

SICAT Suite puede exportar los siguientes datos:

- Historias clínicas (DICOM)
- Estudios 3D
- Documentos

Los datos exportados pueden contener los elementos siguientes:

TIPO DE DATOS	FORMATO DE EXPORTACIÓN
Radiografías 3D	DICOM
Estudios 3D	Propietario de SICAT
Documento	PDF

SICAT Suite exporta radiografías 3D y estudios a archivos ZIP o a directorios DICOM. En caso necesario, SICAT Suite puede anonimizar los datos de paciente para la exportación.

Para exportar datos, realice las siguientes acciones en el orden indicado:

- Abra la ventana **Transferir datos**. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Transferir datos"* [▶ *Página 166 - SIDEXIS XG*].
- Exporte los datos deseados. Encontrará información sobre ello en *Exportar datos* [▶ *Página 167 - SIDEXIS XG*].

30.1 ABRIR LA VENTANA "TRANSFERIR DATOS"

Para exportar datos, en primer lugar debe abrir la ventana **Transferir datos**.

Para abrir la ventana **Transferir datos** en SICAT Suite como plugin de SIDEXIS XG, haga lo siguiente:



- Haga clic en el símbolo **Transferir datos** de la **Barra de exploración**.
- ▶ Se abre la ventana **Transferir datos**.




SICAT Suite exporta solamente las radiografías 3D y los proyectos de planificación seleccionados de la historia clínica activa.

Continúe con *Exportar datos* [▶ *Página 167 - SIDEXIS XG*].

30.2 EXPORTAR DATOS

Para exportar estudios, haga lo siguiente:

- La ventana **Transferir datos** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Transferir datos"* [► *Página 166 - SIDEXIS XG*].

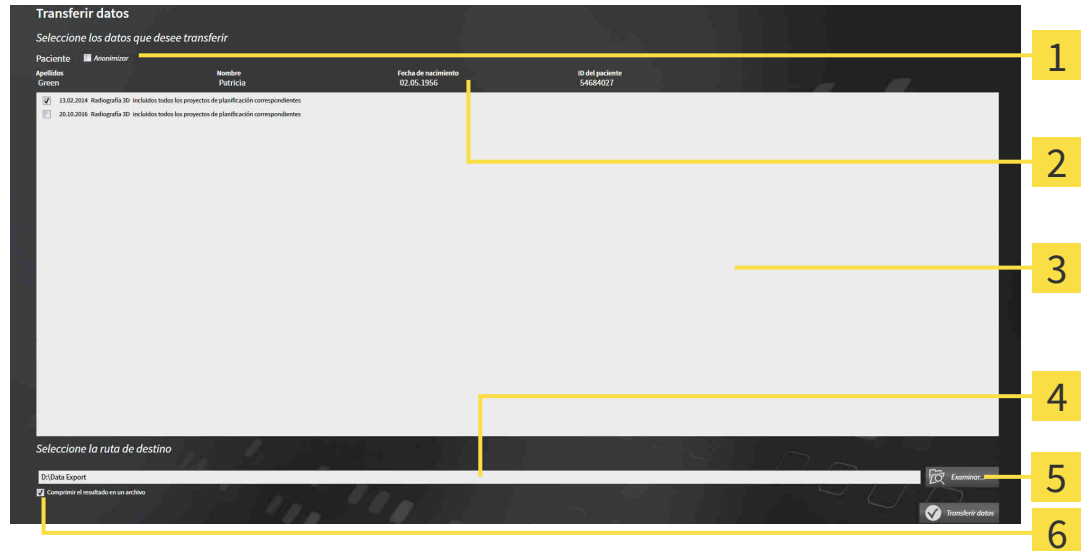

1 Casilla de comprobación **Anonimizar**

4 Campo **Seleccione la ruta de destino**

2 Atributos de la historia clínica

5 Botón **Transferir datos**

3 Lista de estudios 3D

6 Casilla de comprobación **Comprimir el resultado en un archivo**

- Si lo desea, active la casilla de comprobación **Anonimizar** en la ventana **Transferir datos**.
 - Los atributos de la historia clínica exportada cambian a **Paciente** para **Apellidos**, a **Anónimo** para **Nombre** y a **01.01.** con año de nacimiento para **Fecha de nacimiento**. Los atributos de la historia clínica en el archivador de historias clínicas permanecen invariables.

- Asegúrese de que estén seleccionados los estudios 3D deseados del paciente deseado.



- Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Buscar carpeta**.
- En la ventana **Buscar carpeta**, seleccione una carpeta de destino y haga clic en **OK**.
 - La ventana **Buscar carpeta** se cierra y SICAT Suite transfiere la ruta de la carpeta deseada al campo **Seleccione la ruta de destino**.

- Active o desactive la casilla de comprobación **Comprimir el resultado en un archivo**.



- Haga clic en el botón **Transferir datos**.

- SICAT Suite exporta los estudios seleccionados a un archivo ZIP o a la carpeta seleccionada.

Tanto los archivos ZIP como las carpetas contienen las radiografías 3D en formato DICOM y datos de planificación en un formato de archivo propio. Las radiografías 3D pueden verse con cualquier visor DICOM, y los datos de planificación, con la aplicación SICAT correspondiente.

31 PROCESO DE PEDIDO

Para encargar el producto deseado, haga lo siguiente:

- En SICAT Endo, coloque los datos de planificación deseados para plantillas de perforación en la cesta de la compra. Encontrará información sobre ello en *Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra* [▶ *Página 169 - SIDEXIS XG*].
- Compruebe la cesta de la compra e inicie el pedido. Encontrará información sobre ello en *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 174 - SIDEXIS XG*].
- Termine el pedido directamente en el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite o en otro PC con una conexión activa a Internet. Encontrará información al respecto en *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 175 - SIDEXIS XG*] o en *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 179 - SIDEXIS XG*].



Puede añadir a la cesta de la compra pedidos que pertenezcan a la misma radiografía 3D. Después debería completar el proceso de pedido, ya que el contenido de la cesta de la compra se pierde al salir de SICAT Suite.

31.1 COLOCAR PLANTILLAS DE PERFORACIÓN EN LA CESTA DE LA COMPRA



PRECAUCIÓN

El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.

Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.



PRECAUCIÓN

Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

Encontrará información general sobre el proceso de pedido en *Proceso de pedido* [▶ *Página 168 - SIDEXIS XG*].


En SICAT Endo se coloca en el primer paso del proceso de pedido una **SICAT GUIDE (ENDO)** plantilla de perforación en la cesta de la compra. Para poder colocar una **SICAT GUIDE (ENDO)** en la cesta de la compra, debe cumplir determinados requisitos. Si no cumple todos los requisitos, SICAT Endo lo notifica.

SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 49 - SIDEXIS XG*].



1. Haga clic en el símbolo **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)**.
▶ Se abre la ventana **Pedido incompleto**:

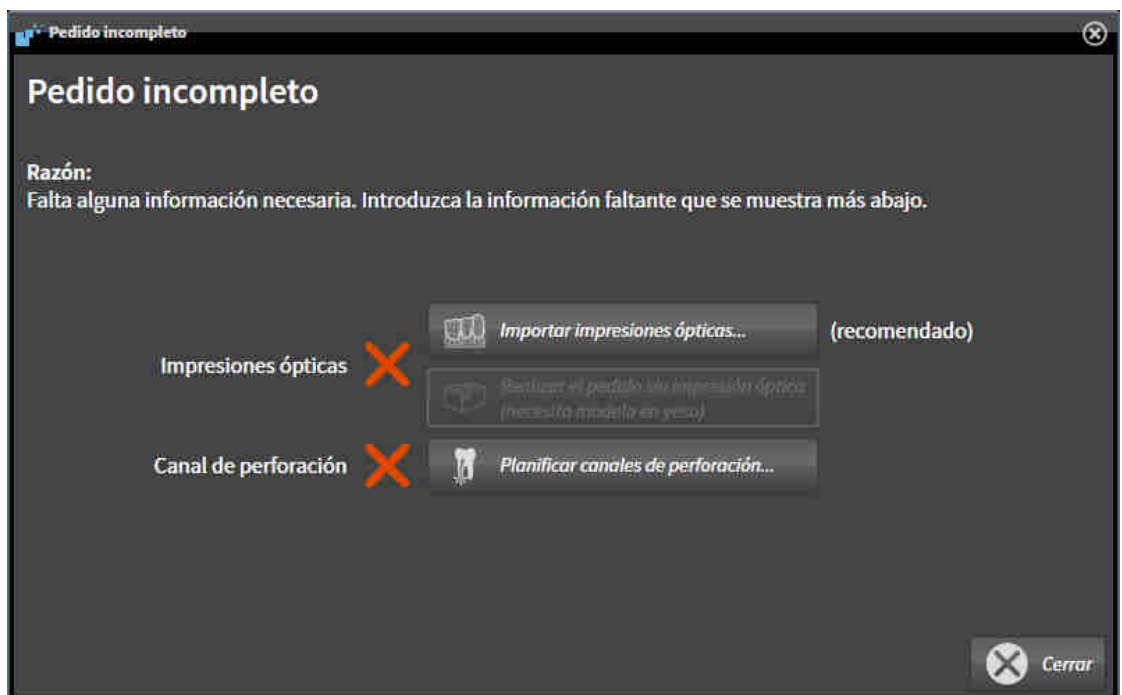

2. Si todavía no ha registrado ninguna impresión óptica, haga clic en el botón **Importar impresiones ópticas** e importe una impresión óptica que sea adecuada para la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Impresiones ópticas* [▶ *Página 98 - SIDEXIS XG*].

- Si todavía no ha planificado ningún canal de perforación, haga clic en el botón **Planificando canales de perforación** y coloque como mínimo un canal de perforación. Encontrará información sobre ello en *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 145 - SIDEXIS XG*].



Es posible que tenga que adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica antes de importar las impresiones ópticas. Puede activar la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** directamente desde la ventana **Importar y registrar impresiones ópticas** en el paso **Registrar** haciendo clic en el botón **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 95 - SIDEXIS XG*].



Si en lugar de impresiones ópticas quiere enviar impresiones de yeso a SICAT, también puede colocar plantillas de perforación sin impresiones ópticas en la cesta de la compra haciendo clic en el botón **Realizar el pedido sin impresión óptica (necesita modelo en yeso)** de la ventana **Pedido incompleto**. A continuación, el paso **Pedir plantilla de perforación** muestra la información **Este pedido no contiene ninguna impresión óptica. Envíe los modelos de yeso correspondientes a SICAT**.

SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS


- Ya ha importado al menos una impresión óptica.
- Ya ha colocado EndoLines.
- Ya ha colocado canales de perforación.
- El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 49 - SIDEXIS XG*].



- Haga clic en el símbolo **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)**.
- ▶ Se abre la ventana **Pedir plantilla de perforación**.

COMPRUEBE SU PEDIDO EN LA VENTANA PEDIR PLANTILLA DE PERFORACIÓN

La ventana **Pedir plantilla de perforación** ya está abierta:

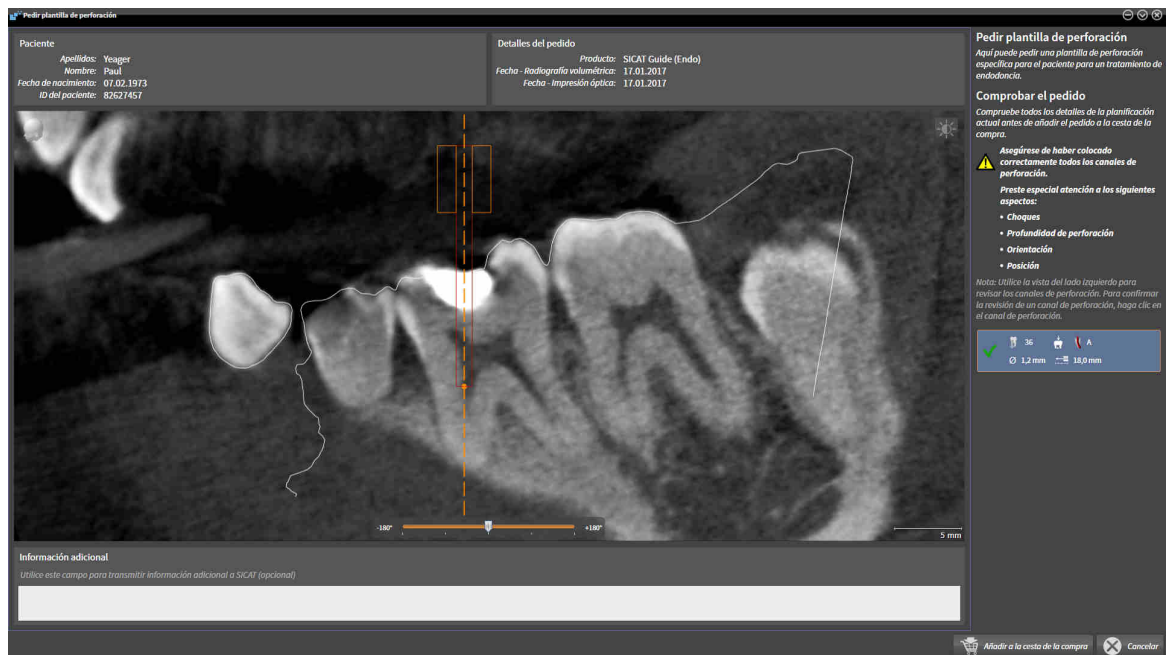

1. En el área **Paciente** y en el área **Detalles del pedido**, compruebe si la información del paciente y la información de la radiografía son correctas.
2. Revise si ha colocado correctamente todos los canales de perforación.
3. Para confirmar la comprobación de un canal de perforación, marque el objeto planificado Endo correspondiente en el área **Comprobar el pedido**.
 - ▶ SICAT Endo marca el objeto planificado Endo.
4. Ponga una marca de verificación.
 - ▶ SICAT Endo muestra una marca de verificación verde.
5. Repita los pasos para todos los canales de perforación que contenga su pedido.
6. Si lo desea, introduzca información adicional para SICAT en el campo **Información adicional**.
7. Haga clic en el botón **Añadir a la cesta**.



- ▶ SICAT Endo coloca los datos de planificación deseados para **SICAT GUIDE (ENDO)** en la cesta de la compra de SICAT Suite.
- ▶ La ventana **Pedir plantilla de perforación** se cierra.
- ▶ SICAT Endo abre la cesta de la compra de SICAT Suite.



Puede añadir un pedido a la cesta de la compra únicamente si ha revisado todos los canales de perforación planificados y ha confirmado la revisión para cada canal de perforación.



En caso de haber detectado un error durante la comprobación de los canales de perforación, pero si ya ha confirmado la comprobación poniendo al menos una marca de verificación, haga clic en el botón **Cancelar** y, a continuación, realice de nuevo los pasos para la comprobación de su pedido.



Siempre que haya un pedido en la cesta de la compra, ya no podrá sobrescribir impresiones ópticas, EndoLines ni canales de perforación. No podrá volver a hacerlo hasta que finalice o elimine el pedido. Si sobrescribe o elimina las impresiones ópticas, EndoLines o canales de perforación de una planificación, no podrá volver a encargar la misma plantilla de perforación.



Puede cancelar el pedido haciendo clic en **Cancelar**.

Continúe con *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 174 - SIDEXIS XG*].

31.2 ABRIR LA CESTA DE LA COMPRA



El icono **Cesta de la compra** muestra el número de elementos que hay en la cesta de la compra.

- ☑ La cesta de la compra contiene al menos un producto.



- Si la cesta de la compra no está abierta ya, haga clic en el botón **Cesta de la compra** de la **Barra de exploración**.

- ▶ Se abre la ventana **Cesta de la compra**.

Continúe con la siguiente acción:

- *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ [Página 174 - SIDEXIS XG](#)]

31.3 COMPROBAR LA CESTA DE LA COMPRA Y FINALIZAR EL PEDIDO

- ☑ La ventana **Cesta de la compra** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la cesta de la compra* [▶ *Página 173 - SIDEXIS XG*].
- 1. En la ventana **Cesta de la compra**, compruebe si están incluidos los productos deseados.
- 2. Haga clic en el botón **Finalizar el pedido**.
- ▶ SICAT Suite fija el estado de los pedidos en **En preparación** y establece una conexión con el servidor SICAT a través de SICAT WebConnector.
- ▶ Si dispone de una conexión activa a Internet, las modificaciones en el pedido solo podrán efectuarse en el portal SICAT.

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 175 - SIDEXIS XG*]
- *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 179 - SIDEXIS XG*]

31.4 FINALIZAR EL PEDIDO CON AYUDA DE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET



En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.

- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
 - ☑ El portal SICAT se ha abierto automáticamente en su navegador.
1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra los productos contenidos y los precios respectivos agrupados por paciente.
 2. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 176 - SIDEXIS XG*].
 - ▶ SICAT Suite prepara los datos de pedido para la carga.
 - ▶ Tan pronto como se terminan los preparativos, SICAT WebConnector transfiere los datos de pedido al servidor SICAT a través de una conexión encriptada.
 - ▶ En la cesta de la compra, el estado del pedido pasa a **Cargando**.



Puede añadir a la cesta de la compra pedidos que estén basados en la misma radiografía 3D. Después debería completar el proceso de pedido, ya que el contenido de la cesta de la compra se pierde al salir de SICAT Endo.



Si cierra y vuelve a abrir SIDEXIS XG, SICAT Suite muestra que el pedido está totalmente cargado con independencia de cuál es su estado real. El estado real puede verse en SICAT WebConnector. Encontrará más información al respecto en *SICAT WebConnector* [▶ *Página 177 - SIDEXIS XG*].



Si cierra la sesión de Windows durante la carga, SICAT WebConnector detiene el proceso. El software reanuda automáticamente la carga tras iniciar sesión otra vez.

31.5 REALIZAR LOS PASOS DE PEDIDO EN EL PORTAL SICAT

Después de realizar los pasos de pedido en SICAT Suite, se abre el portal SICAT en su navegador web estándar. En el portal SICAT puede modificar sus pedidos, seleccionar proveedores cualificados para la fabricación y ver los precios de los productos.

Para realizar los pasos de pedido en el portal SICAT, haga lo siguiente:

1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
2. Compruebe si están incluidos los productos deseados.
3. Si es necesario, elimine pacientes y, con ello, también todos los respectivos productos de la vista general de pedidos. Al finalizar el pedido, SICAT Suite adopta las modificaciones que se han realizado en el portal SICAT.
4. Compruebe si la dirección de facturación y la dirección de suministro son correctas. Modifíquela si es necesario.
5. Elija la forma de envío deseada.
6. Acepte las condiciones comerciales generales y envíe el pedido.



Puede eliminar pacientes y todas las férulas respectivas del portal SICAT seleccionando un paciente y haciendo clic en el botón para eliminar pacientes. Después, en la cesta de la compra volverá a tener acceso completo a la recopilación de productos.

31.6 SICAT WEBCONNECTOR



El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 8 - SIDEXIS XG*].



En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.


Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, SICAT Suite transfiere los pedidos codificados y en segundo plano a través de SICAT WebConnector. SICAT Endo muestra el estado de las transferencias directamente en la cesta de la compra y puede pausar SICAT WebConnector. SICAT WebConnector reanuda la transferencia cuando se cierra SICAT Suite. Si la carga no se puede llevar a cabo de la forma deseada, puede abrir la interfaz de usuario de SICAT WebConnector.

ABRIR LA VENTANA "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- En el área de notificación de la barra de tareas, haga clic en el símbolo **SICAT Suite WebConnector**.

▶ Se abre la ventana **SICAT Suite WebConnector**:

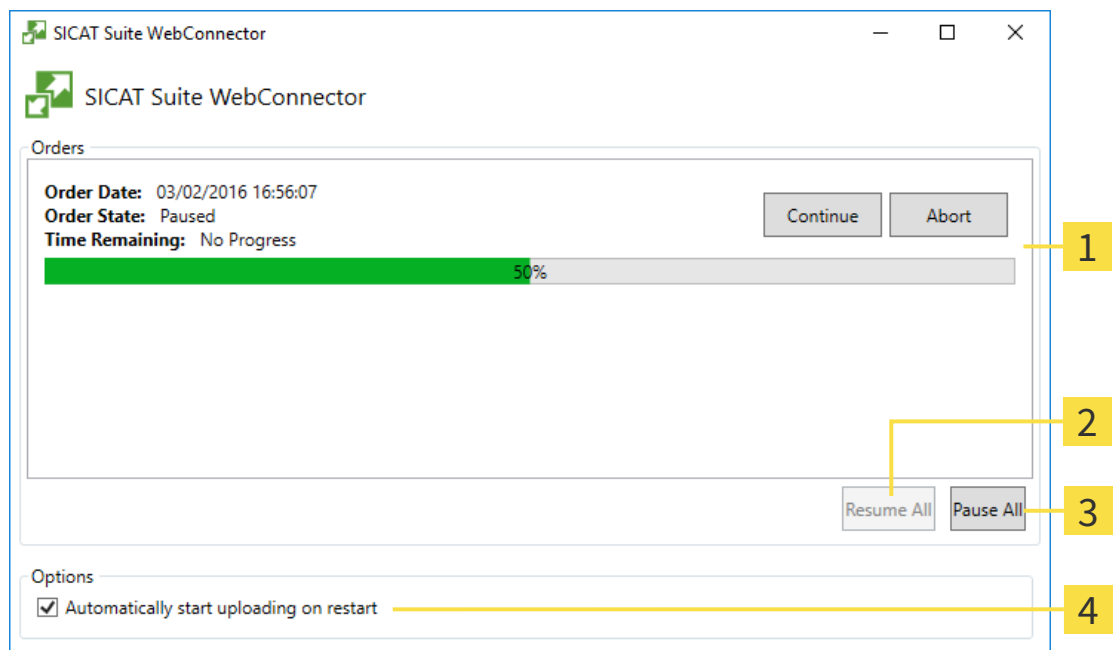

1 Lista **Pedidos**

3 Botón **Detener todos**

2 Botón **Reanudar todos**

4 Casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**

La lista **Pedidos** muestra la cola de espera de los pedidos.

INTERRUMPIR Y CONTINUAR CON LA CARGA

Puede cancelar el proceso de carga. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la conexión a Internet está sobrecargada. Los ajustes solamente se aplican a los procesos de carga en SICAT WebConnector. Los procesos de carga a través de navegador web no se ven afectados.

La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Detener todos**.
 - ▶ SICAT WebConnector interrumpe la carga de todos los pedidos.
2. Haga clic en el botón **Reanudar todos**.
 - ▶ SICAT WebConnector reanuda la carga de todos los pedidos.

DESACTIVAR LA REANUDACIÓN AUTOMÁTICA TRAS UN REINICIO

Puede impedir que SICAT WebConnector reanude automáticamente la carga después de reiniciar Windows.

La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

- Desactive la casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**.
- ▶ Cuando reinicie su PC, SICAT WebConnector ya no reanudará automáticamente la carga de sus pedidos.

31.7 FINALIZAR EL PEDIDO SIN UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite no puede establecer conexión al servidor de SICAT, SICAT Suite abre la ventana **Error al conectar con el servidor de SICAT**. La ventana le muestra una de las siguientes causas del problema:

- **No hay ninguna conexión a Internet disponible. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**
- **El portal SICAT no está disponible**
- **No está instalado el servicio "SICATWebConnector"**
- **No se ha iniciado el servicio "SICATWebConnector"**
- **Se ha producido un error desconocido. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**

Este capítulo tan solo muestra las capturas de pantalla en caso de que no tenga conexión a Internet.

En las causas encontrará los posibles pasos para solucionar el problema.

De manera alternativa a la solución de fallos, puede cargar un pedido a través de un navegador en otro PC con conexión a Internet activa. Para los pedidos mediante el navegador, SICAT Suite exporta todos los productos de la cesta de la compra a la vez y crea una subcarpeta por paciente. En cada subcarpeta hay un archivo XML con los datos para el pedido y una carpeta ZIP con los datos que SICAT necesita para la producción. En el portal SICAT puede cargar sucesivamente el archivo XML y la carpeta ZIP. La transferencia está encriptada.

Para finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:


- El PC en el que se ejecuta SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet.
- Una ventana muestra el siguiente mensaje: **Error al conectar con el servidor de SICAT**



1 Botón **Cargar desde otro equipo**

1. Haga clic en el botón **Cargar desde otro equipo**.

► Se abre la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**:

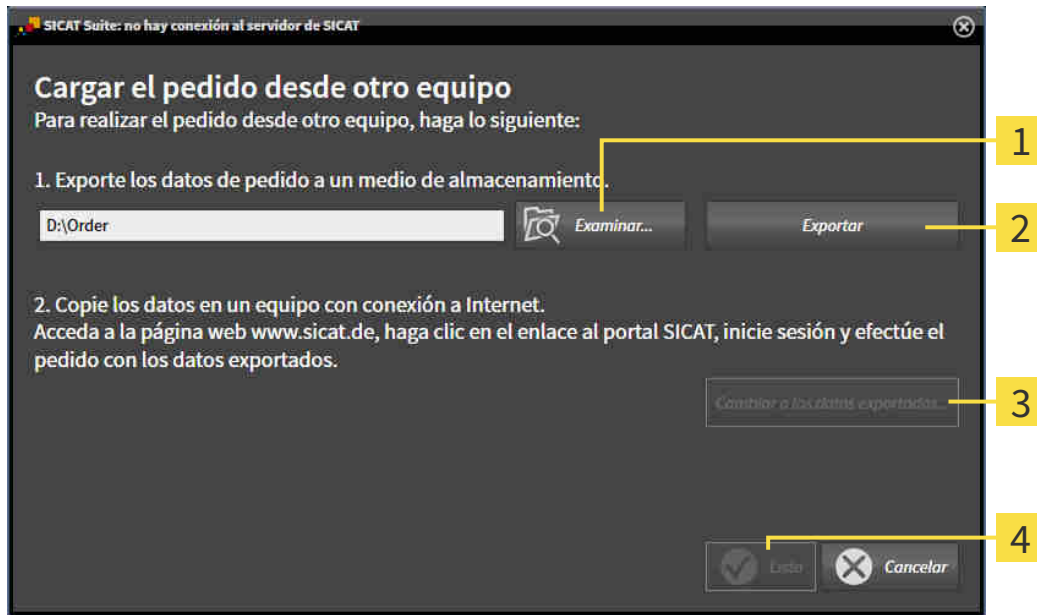

1 Botón **Examinar**


3 Botón **Cambiar a los datos exportados**

2 Botón **Exportar**

4 Botón **Listo**

2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
3. Elija un directorio que ya exista o cree uno nuevo y haga clic en **OK**. Tenga en cuenta que la ruta del directorio no puede tener más de 160 caracteres.
4. Haga clic en el botón **Exportar**.
 - SICAT Suite exporta, a la carpeta indicada, todos los datos necesarios para pedir el contenido de la cesta de la compra. Al hacerlo, SICAT Suite crea una subcarpeta para cada paciente.
5. Haga clic en el botón **Cambiar a los datos exportados**.

- ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows que muestra el directorio con los datos exportados:

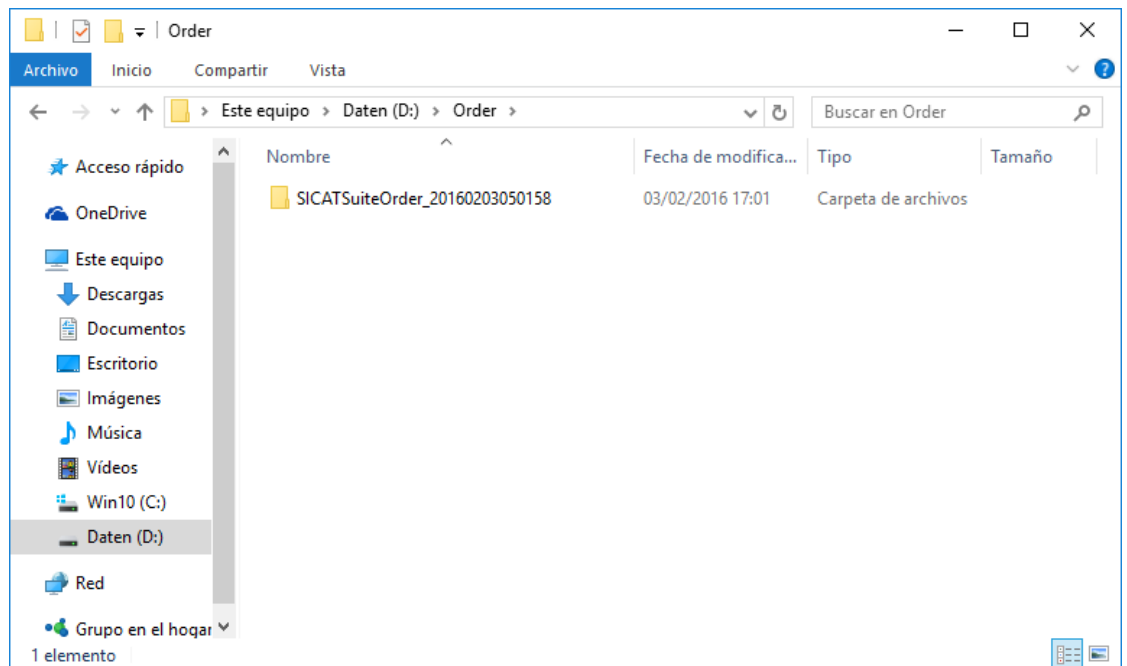

6. Copie la carpeta que contiene los datos de la férula deseada a un PC con una conexión activa a Internet utilizando, por ejemplo, una memoria extraíble USB.
7. En la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**, haga clic en **Listo**.
 - ▶ SICAT Suite cierra la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**.
 - ▶ SICAT Suite elimina de la cesta de la compra todos los productos contenidos en el pedido.
8. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.de>.
9. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - ▶ Se abrirá el portal SICAT.
10. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
11. Haga clic en el enlace para cargar el pedido.
12. Seleccione el pedido deseado en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo XML cuyo nombre empieza por **SICATSuiteOrder**.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra el paciente contenido, el respectivo producto y el precio.
13. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 176 - SIDEXIS XG*].
14. Haga clic en el enlace para cargar los datos de planificación del producto.

15. Seleccione los datos del producto adecuados en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo ZIP que se encuentra en la misma carpeta que el archivo XML que se ha cargado antes y cuyo nombre empieza por **SICATSuiteExport**.
- ▶ Cuando haya realizado el pedido, su navegador transferirá el archivo con los datos del producto al servidor SICAT a través de una conexión a Internet encriptada.



SICAT Suite no elimina automáticamente los datos exportados. Al finalizar un proceso de pedido, por motivos de seguridad debería eliminar manualmente los datos exportados.

32 AJUSTES



Las versiones de SICAT Suite conectadas a SIDEXIS adoptan muchos ajustes de SIDEXIS. Los valores de esos ajustes pueden visualizarse en SICAT Endo, pero solo pueden modificarse en los ajustes de SIDEXIS.

Puede modificar o ver los ajustes generales en la ventana **Ajustes**. Después de hacer clic en el símbolo **Ajustes**, la barra de opciones situada en el lado izquierdo de la ventana **Ajustes** muestra las pestañas siguientes:

- **Generalidades** - Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 184 - SIDEXIS XG*].
- **Licencias** - Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 39 - SIDEXIS XG*].
- **Consulta** - ver o modificar el logotipo y el texto informativo de su consulta, por ejemplo para la utilización en impresiones. Encontrará información sobre ello en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 188 - SIDEXIS XG*].
- **Visualización** - modificar los ajustes de visualización generales. Encontrará información sobre ello en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 189 - SIDEXIS XG*].

Si modifica ajustes, SICAT Endo adopta las modificaciones de inmediato y guarda los ajustes en su perfil de usuario.

32.1 UTILIZAR AJUSTES GENERALES



Las versiones de SICAT Suite conectadas a SIDEXIS adoptan muchos ajustes de SIDEXIS. Los valores de esos ajustes pueden visualizarse en SICAT Endo, pero solo pueden modificarse en los ajustes de SIDEXIS.

Para abrir los ajustes generales, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.

► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Generalidades**.

► Se abre la ventana **Generalidades**:

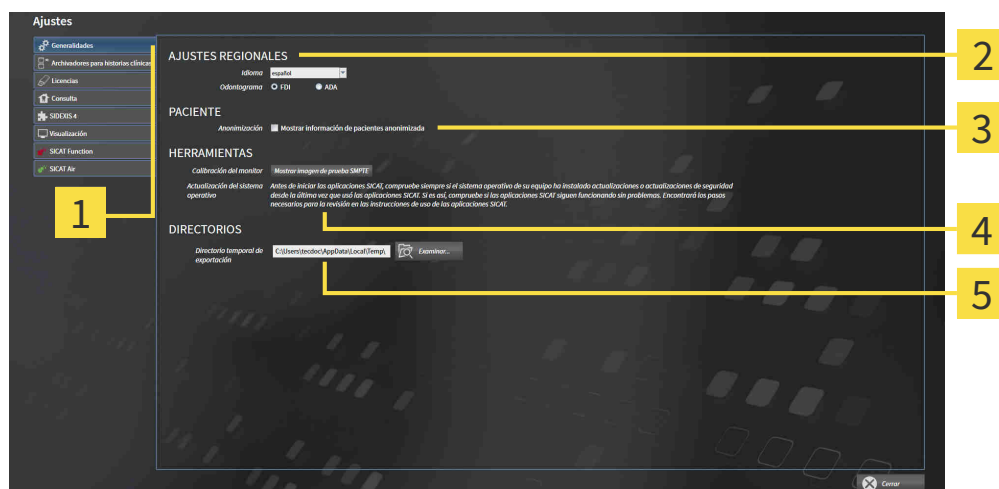

1 Pestaña **Generalidades**

4 Área **HERRAMIENTAS**

2 Área **AJUSTES REGIONALES**

5 Área **DIRECTORIOS**

3 Área **PACIENTE**

SICAT Endo adopta los siguientes ajustes de SIDEXIS, que puede ver aquí:

- En el área **AJUSTES REGIONALES**, puede ver el idioma de la interfaz de usuario en la lista **Idioma**.
- En el área **AJUSTES REGIONALES**, puede ver el odontograma actual en **Odontograma**.
- En el área **PACIENTE**, puede ver el estado de la casilla de comprobación **Mostrar información de pacientes anonimizada**. Si la casilla de comprobación está activada, SICAT Endo adopta los datos de paciente anonimizados de SIDEXIS.

Puede cambiar el siguiente ajuste:

- En el área **DIRECTORIOS**, puede indicar una carpeta en el campo **Directorio temporal de exportación** en la que SICAT Suite guardará los datos de pedido. Debe tener acceso completo a esta carpeta.

Además de visualizar o modificar los ajustes generales, puede abrir la imagen de prueba SMPTE para calibrar su monitor:

- En **HERRAMIENTAS, Calibración del monitor**, haga clic en el botón **Mostrar imagen de prueba SMPTE** para calibrar el monitor. Encontrará información sobre ello en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [▶ *Página 186 - SIDEXIS XG*].



Si en SIDEXIS selecciona un idioma no admitido por SICAT Endo, la interfaz de usuario de SICAT Endo muestra textos en inglés.



Si cambia el idioma de SIDEXIS XG, deberá reiniciar SICAT Suite para que el cambio surta efecto.



Los odontogramas admitidos son FDI y ADA.

32.2 CALIBRACIÓN DEL MONITOR CON LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

PRECAUCIÓN


Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Cuatro propiedades principales determinan si su monitor es adecuado para mostrar datos en aplicaciones SICAT:

- Brillo
- Contraste
- Resolución espacial (linealidad)
- Distorsión (aliasing)

La imagen de prueba SMPTE es una imagen de referencia que le ayudará a comprobar las propiedades de su monitor:

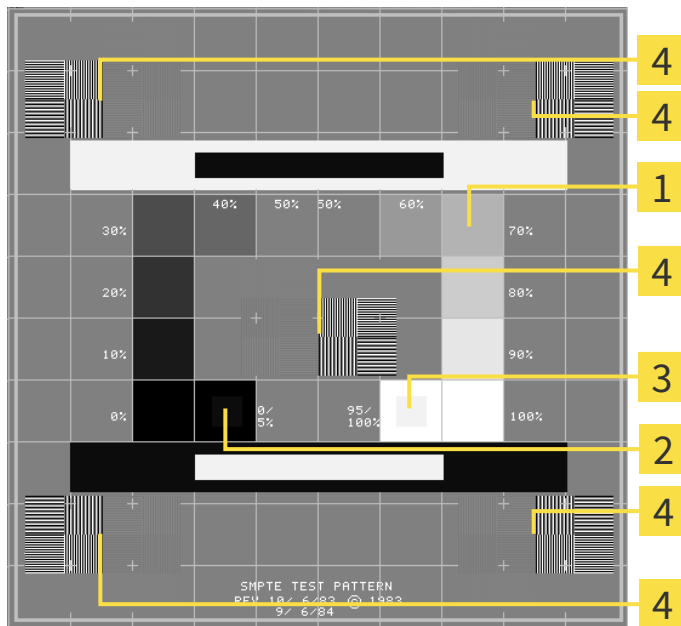

1 Cuadrados de niveles de gris

3 Cuadrado del 100%

2 Cuadrado del 0%

4 Cuadrados que contienen un patrón de barras con un alto contraste

COMPROBAR EL BRILLO Y EL CONTRASTE

En el centro de la imagen de prueba SMPTE, una serie de cuadrados muestran la gradación de los distintos niveles de gris desde el negro (0% de brillo) hasta el blanco (100% de brillo):

- El cuadrado del 0% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 0% y el 5%.
- El cuadrado del 100% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 95% y el 100%.

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- La imagen de prueba SMPTE ya está abierta.
 - Compruebe si en el cuadrado del 0% y en el del 100% puede ver la diferencia visual entre el cuadrado interior y el exterior. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.



Muchos monitores solamente pueden mostrar la diferencia de brillo en el cuadrado del 100% y no en el cuadrado del 0%. Puede reducir la luz ambiental para facilitar la diferenciación de los distintos niveles de brillo en el cuadrado del 0%.

COMPROBAR LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y LA DISTORSIÓN

En las esquinas y en el centro de la imagen de prueba SMPTE, 6 cuadrados muestran un patrón de barras con un alto contraste. En relación con la resolución espacial y la distorsión, debería poder distinguir entre líneas horizontales y verticales con distintas anchuras y que se alternan en blanco y negro:

- De grueso a fino (6 píxeles, 4 píxeles, 2 píxeles)
- Horizontal y vertical

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- En los 6 cuadrados que muestran un patrón de barras con alto contraste, compruebe si puede diferenciar todas las líneas. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.

CERRAR LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

Para cerrar la imagen de prueba SMPTE, haga lo siguiente:

- Pulse la tecla **ESC**.
- ▶ La imagen de prueba SMPTE se cierra.

32.3 UTILIZAR INFORMACIÓN DE LA CONSULTA

Las versiones de SICAT Suite conectadas a SIDEXIS adoptan el logo de la consulta y el texto informativo de SIDEXIS. Por eso, solamente puede ver los valores de estos ajustes en los ajustes de SICAT Suite. Realice las modificaciones de estos ajustes que desee en SIDEXIS.

Las aplicaciones de SICAT Suite utilizan la información aquí mostrada para personalizar impresiones o archivos PDF.

Para abrir la información de la consulta, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.

▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Consulta**.

▶ Se abre la ventana **CONSULTA**:

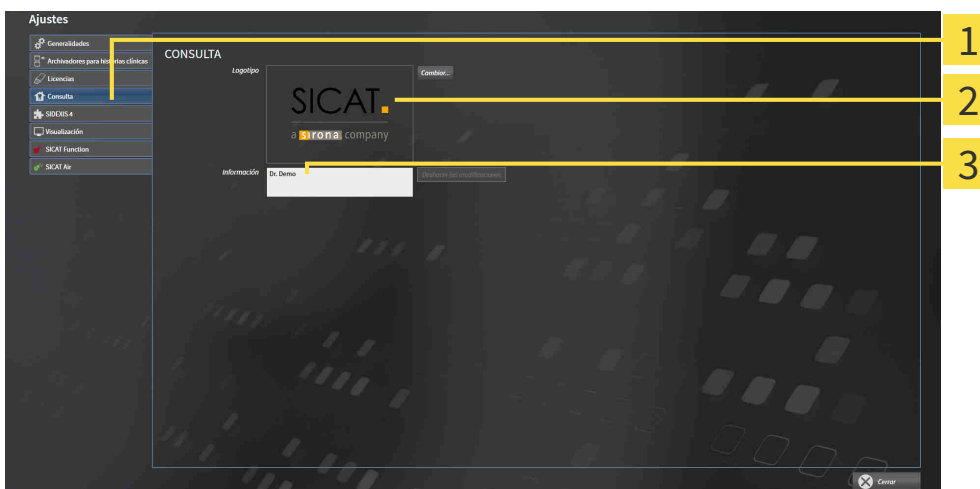

1 Pestaña **Consulta**

2 Área **Logotipo**

3 Área **Información**

Puede ver los siguientes ajustes:

- En el área **Logotipo** puede ver el logotipo de su consulta.
- En el área **Información** puede ver un texto que identifique a su consulta, por ejemplo el nombre y la dirección.

32.4 MODIFICAR LOS AJUSTES DE VISUALIZACIÓN

PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.

PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Los ajustes de visualización determinan la visualización del volumen, de los objetos de diagnóstico y de los objetos planificados en todas las aplicaciones SICAT.


Para abrir la ventana **Visualización**, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Ajustes**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Visualización**.
▶ Se abre la ventana **Visualización**:

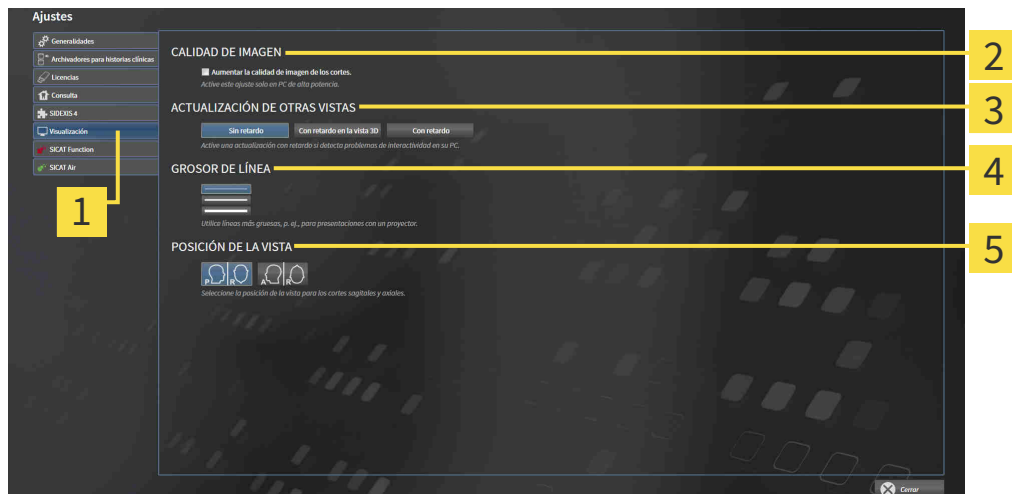

1 Pestaña **Visualización**

4 Área **GROSOR DE LÍNEA**

2 Área **CALIDAD DE IMAGEN**

5 Área **POSICIÓN DE LA VISTA**

3 Área **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS**

Los ajustes son:

- **Aumentar la calidad de imagen de los cortes** - mejora la calidad de la visualización de cortes, ya que el software promedia cortes adyacentes. Active este ajuste solo en PC de alta potencia.
- **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS** - la actualización con retardo mejora la interactividad de la vista activa, pero a costa de un retardo en la actualización de otras vistas. Active la actualización con retardo solo si detecta problemas de interactividad en su PC.
- **GROSOR DE LÍNEA** - modifica el grosor de las líneas. Las líneas más gruesas son útiles para las presentaciones con proyector.
- **POSICIÓN DE LA VISTA** - cambia la posición de la vista de corte **Axial** y de la vista de corte **Sagital**.

33 SERVICIO DE ASISTENCIA

SICAT ofrece las siguientes opciones de asistencia:

- Documentos PDF
- Contacto
- Información sobre el SICAT Suite y las aplicaciones SICAT instalados

Continúe con la siguiente acción:

- *Abrir opciones de asistencia* [▶ *Página 192 - SIDEXIS XG*]



33.1 ABRIR OPCIONES DE ASISTENCIA



Puede abrir la ventana **Servicio de asistencia** haciendo clic en el símbolo **Servicio de asistencia** de la **Barra de exploración** o pulsando la tecla F1.

La ventana **Servicio de asistencia** de SICAT Suite se compone de las siguientes pestañas:



- **Instrucciones de utilización** - Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 38 - SIDEXIS XG*].



- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Información de contacto y herramientas de ayuda* [▶ *Página 193 - SIDEXIS XG*].



- **Información** - Encontrará información sobre ello en *Información* [▶ *Página 194 - SIDEXIS XG*].

33.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO Y HERRAMIENTAS DE AYUDA

La ventana **Servicio de asistencia** contiene toda la información y todas las herramientas relevantes para que el servicio de asistencia de SICAT pueda ayudarle:



1 Pestaña **Servicio de asistencia**

3 Área **AYUDA INTERACTIVA**

2 Área **DATOS DE CONTACTO**

4 Área **HERRAMIENTAS DE AYUDA**

En el área **DATOS DE CONTACTO** se indica dónde encontrar instrucciones de utilización.

En el área **AYUDA INTERACTIVA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Preparar** del área **Sesión de TeamViewer**, SICAT Endo abre una sesión de TeamViewer.

TeamViewer es un software que permite controlar comandos del ratón y del teclado a distancia y transferir el contenido de la pantalla de un PC a través de una conexión activa a Internet. TeamViewer establece una conexión solamente con su autorización expresa. Para ello, transmita una ID de TeamViewer y una contraseña al servicio de asistencia de SICAT. Esto permitirá que el servicio de asistencia de SICAT le ayude directamente in situ.

En el área **HERRAMIENTAS DE AYUDA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Mostrar** del área **Información del sistema**, SICAT Endo abre la información de sistema del sistema operativo.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Archivos de registro**, SICAT Endo abre el directorio de registro de SICAT Suite en una ventana del explorador de archivos de Windows.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Información sobre SICAT Suite**, SICAT Endo exporta información sobre la instalación actual a un archivo de texto.
- Después de hacer clic en el área **Información sobre SICAT Suite** en el botón **Mostrar notificaciones**, SICAT Endo muestra la ventana de notificaciones.

33.3 INFORMACIÓN

La ventana **Información** muestra información sobre SICAT Suite y todas las aplicaciones SICAT instaladas en varias pestañas:



34 ABRIR DATOS PROTEGIDOS CONTRA ESCRITURA

Puede abrir datos protegidos contra escritura.

El estado de la licencia y el hecho de estar utilizándose o no la radiografía 3D actual determina qué datos pueden verse en SICAT Endo como plugin de SIDEXIS XG sin poder realizar ni guardar cambios:

TIPO DE LICENCIA SICAT ENDO	OTRA ESTACIÓN DE TRABAJO SIDEXIS XG ESTÁ UTILIZANDO LA RADIOGRAFÍA 3D	¿ES POSIBLE VISUALIZAR SIN REALIZAR CAMBIOS?
Nunca	No relevante	No
Viewer	No relevante	Sí
Versión completa	Sí	Sí
Versión completa	No	No

En los siguientes casos, puede ver estudios de SICAT Endo también sin licencia del Viewer:

- Exporte estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4 e importe los datos en SIDEXIS en otro PC. SICAT Endo debe estar instalado en este PC.
- Cree un paquete Wrap&Go que contenga estudios de SICAT Endo desde SIDEXIS 4. Instale el paquete Wrap&Go en otro PC. Después, instale SICAT Endo.

En ambos casos, no podrá realizar o guardar cambios en la planificación.



Encontrará más información sobre la compatibilidad de multiestaciones de trabajo de SIDEXIS XG en las Instrucciones de utilización de SIDEXIS XG.

Para abrir datos sin poder realizar ni guardar cambios, haga lo siguiente:

1. Inicie SICAT Suite junto con una radiografía 3D de Sirona SIDEXIS XG. Encontrará información sobre ello en *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 34 - SIDEXIS XG*].
 - ▶ SICAT Suite abre la radiografía 3D y los proyectos de planificación de la exploración de SIDEXIS XG actual.
 - ▶ Si otra estación de trabajo SIDEXIS XG está utilizando la radiografía 3D actual, se abre una ventana que muestra el siguiente mensaje: **Otro usuario está editando la historia clínica, por lo que solo puede abrirse en modo de lectura**
2. Haga clic en el botón **Abrir en modo de lectura** de la ventana de notificación.
 - ▶ SICAT Suite abre la radiografía 3D y los proyectos de planificación de la exploración de SIDEXIS XG actual.



Deben cumplirse las siguientes condiciones para que pueda adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica:

- Ha activado una licencia con la que puede abrir radiografías 3D o estudios de SICAT Endo. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 39 - SIDEXIS XG*].
- Para la radiografía 3D, no hay objetos que pudieran verse afectados por una modificación de la alineación del volumen o la curva panorámica en ningún estudio de solo lectura correspondiente de SICAT Function o cualquier otra aplicación de SICAT.

Si no se dan las condiciones, SICAT Endo desactiva en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** los botones y elementos de control que puede utilizar para realizar cambios en la alineación del volumen o la curva panorámica.

35 CERRAR SICAT ENDO

Para cerrar SICAT Endo, haga lo siguiente:



- En el área de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Cerrar**.
 - ▶ SICAT Suite guarda la historia clínica activa del paciente.
 - ▶ SICAT Suite cierra todas las aplicaciones SICAT.
 - ▶ SICAT Suite cierra la historia clínica activa del paciente.

36 CERRAR SICAT SUITE



- En la esquina superior derecha de SICAT Endo, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ Todas las aplicaciones SICAT se cierran.
- ▶ SIDEXIS guarda los proyectos de planificación modificados de todas las aplicaciones SICAT que se están ejecutando como versión completa.

37 MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO



Al situar el puntero del ratón sobre determinadas funciones, SICAT Endo muestra junto al nombre de la función el método abreviado de teclado entre paréntesis.

En todas las aplicaciones SICAT están disponibles los siguientes métodos abreviados de teclado:

MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO	DESCRIPCIÓN
A	Añadir medición de ángulo
D	Añadir medición de distancia
F	Enfocar un objeto activo
Ctrl + C	Copiar el contenido de la vista activa en el portapapeles
Ctrl + Z	Deshacer la última acción de objeto
Ctrl + Y	Volver a realizar la última acción de objeto deshecha
Supr	Eliminar el objeto activo o grupo de objetos activo
ESC	Cancelar la acción actual (por ejemplo, añadir una medición)
F1	Abrir la ventana Servicio de asistencia , abrir las instrucciones de utilización con la aplicación de SICAT activa

38 DESINSTALAR SICAT SUITE




El programa de desinstalación de SICAT Suite conserva las licencias activas en su PC. Por esa razón, antes de la desinstalación el programa de instalación de SICAT Suite avisa de que no elimina automáticamente las licencias. Si ya no desea utilizar SICAT Suite en ese PC, desactive las licencias antes de la desinstalación. Encontrará más información al respecto en *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 46 - SIDEXIS XG*].



Antes de desinstalar SICAT Suite, asegúrese de que SICAT WebConnector ha terminado de cargar todos los pedidos, ya que el programa de desinstalación cierra automáticamente SICAT WebConnector. Encontrará más información al respecto en *SICAT WebConnector* [▶ *Página 177 - SIDEXIS XG*].

Para desinstalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT WebConnector ha cargado correctamente todos los pedidos.
- 1. En el **Panel de control** de Windows, haga clic en **Programas y funciones**.
 - ▶ Se abre la ventana **Programas y funciones**.
- 2. En la lista, elija la opción **SICAT Suite**, que contiene la versión de SICAT Suite.
- 3. Haga clic en el botón **Desinstalar**.
 - ▶ El programa de desinstalación se inicia y se abre la ventana **PROGRESO**:

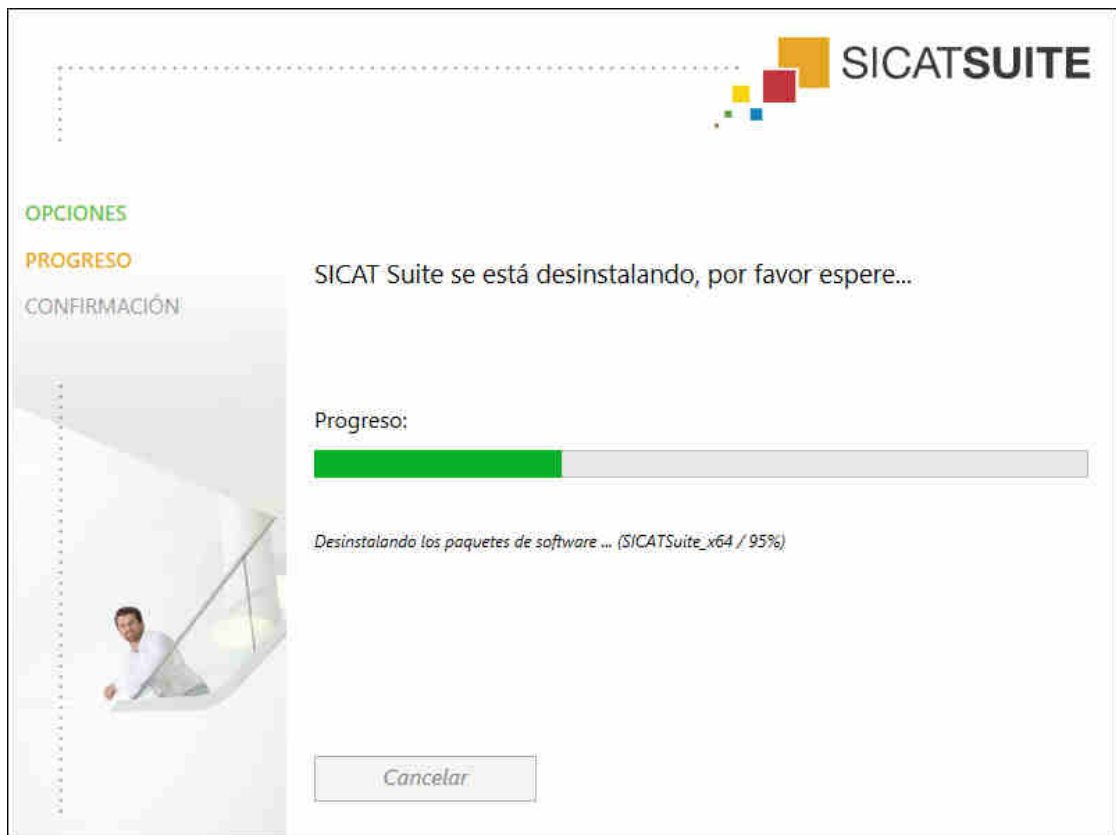

- Una vez terminada la desinstalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**:



4. Haga clic en el botón **Finalizar**.

- El programa de desinstalación de SICAT Suite se cierra.



Para abrir el programa de desinstalación de SICAT Suite, puede iniciar también el programa de instalación de SICAT Suite en un PC en el que ya está instalado SICAT Suite.



El programa de desinstalación de SICAT Suite abre los programas de desinstalación de algunos requisitos de software que se han instalado junto con SICAT Suite. Si otras aplicaciones instaladas siguen necesitando los requisitos de software, estos se conservan.

39 NOTAS SOBRE SEGURIDAD

RADIOGRAFÍAS 3D


PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.


PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.


PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.


PRECAUCIÓN

El uso de otros datos que no sean las radiografías 3D como fuentes de información para la planificación de una terapia basada en las mediciones podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice las radiografías 3D para el diagnóstico y la planificación si utiliza la funcionalidad de medición.

RADIOGRAFÍAS INTRAORALES


PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas para el registro de radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice únicamente radiografías 3D que solo contengan pocos artefactos o ninguno.
2. Utilice solo radiografías 3D que cuenten con una resolución lo suficientemente alta.


PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no coincidan con el paciente ni con la radiografía 3D o cuyo momento de adquisición diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que, en una radiografía intraoral, coincidan el paciente y la radiografía 3D, y de que el momento de adquisición no diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D.


PRECAUCIÓN

Una orientación incorrecta de las radiografías intraorales en relación con las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Compruebe que las radiografías intraorales registradas estén correctamente adaptadas a la radiografía 3D.
2. En caso necesario, gire las radiografías intraorales para orientarlas correctamente.


PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que las radiografías intraorales se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D.


PRECAUCIÓN

Los dispositivos para radiografías intraorales no aprobados como productos médicos podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de utilizar para las radiografías intraorales únicamente dispositivos aprobados como productos médicos.


PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de las radiografías intraorales importadas.


PRECAUCIÓN

Una calidad insuficiente de las radiografías intraorales o las radiografías 3D podrían conllevar que el mecanismo de registro de las radiografías intraorales fallara.

Utilice únicamente radiografías intraorales y radiografías 3D que permitan un registro correcto.


PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente radiografías intraorales que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.


PRECAUCIÓN

Una posición u orientación incorrecta de las radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Después del registro, compruebe la correcta posición y orientación de las radiografías intraorales con los dientes en la radiografía 3D.

CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN


PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.


PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

GESTIÓN DE DATOS


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.


PRECAUCIÓN

La eliminación de datos originales podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

No elimine los datos originales tras la importación.


PRECAUCIÓN

La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.


PRECAUCIÓN

Si elimina historias clínicas, todas las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos también se eliminarán.

Elimine historias clínicas únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos.


PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.


PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

SEGURIDAD



Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.



Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.



Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE



Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.



Los medios de instalación dañados podrían hacer que la instalación fallara.

Trate los medios de instalación con cuidado y almacénelos de forma adecuada.



Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.



Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.



Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

PEDIDOS



El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.

Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.



Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

IMPRESIONES ÓPTICAS



El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.



Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.



Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.



La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.



La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.



Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.



La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.



Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.

RED


PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.


PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.


PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.

ODONTOGRAMA


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta de los números de dientes podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que coincidan los números de dientes seleccionados y los números de dientes anatómicos reales.

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN


PRECAUCIÓN

Una profundidad de perforación incorrecta puede conllevar un tratamiento incorrecto.

Asegúrese de que la profundidad de perforación y el taladro seleccionado coincidan.

OBJETOS PLANIFICADOS


PRECAUCIÓN

El uso de la vista 3D para visualizar mediciones y objetos de planificación podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice la vista 3D únicamente de orientación y como fuente de información adicional.

40 PRECISIÓN

La siguiente tabla muestra los valores de precisión en todas las aplicaciones SICAT:

Exactitud de la medida para las mediciones de distancias	< 100 μm
Exactitud de la medida para las mediciones de ángulos	< 1 grado
Precisión de la visualización	< 20 μm

GLOSARIO

ADA

American Dental Association (Asociación Dental Americana)

Aplicación

Las aplicaciones SICAT son programas que pertenecen a SICAT Suite.

Barra de exploración

La barra de exploración situada en la parte superior de SICAT Suite contiene los símbolos más importantes de SICAT Suite. Si una historia clínica está activa, la barra de exploración permite cambiar entre la historia clínica y diferentes aplicaciones.

Canal de perforación

Tomando como base la vía planificada para la perforación del EndoLine, que puede representarse gráficamente y editarse en el software.

CPR

Curved Planar Reformation, proceso de reconstrucción bidimensional de imágenes de radiografías 3D que se aplica para facilitar la representación de estructuras complejas.

EndoLine

Un EndoLine es una línea de medición multifuncional que sirve para marcar el canal de la raíz a tratar y para localizar la punta de la raíz.

FDI

Fédération Dentaire Internationale, Federación Dental Internacional

Foco

Círculo destacado en una sección de una imagen para comprobar la superposición de la radiografía intraoral y la proyección en 3D en el marco del registro de radiografías intraorales.

Impresiones ópticas

Una impresión óptica es el resultado de una adquisición superficial 3D de dientes, materiales de impresión o modelos de yeso.

Marco

En la vista 3D, los marcos muestran las posiciones de las vistas de corte 2D.

Portal SICAT

El portal SICAT es una página de Internet en la que puede pedir, entre otros elementos, férulas a SICAT.

Radiografía intraoral

Una radiografía intraoral es una radiografía 2D de dientes concretos que se toma con ayuda de una película dental detrás del diente y una fuente de rayos X fuera de la boca, y se caracteriza por una alta precisión de los detalles.

Registro

Alineación espacial

Retículos

Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte.

SIXD

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (sociedad de ingenieros cinematográficos y de televisión)

SSI

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

STL

Surface Tessellation Language, formato de archivo estándar para intercambiar datos de malla que pueden contener, por ejemplo, impresiones ópticas.

Ventana de notificación


La ventana de notificación muestra, en el margen inferior derecho de la pantalla, mensajes sobre procesos terminados.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A			
Abrir datos protegidos contra escritura	195	Cerrar	198
Ajustes	183	Cerrar SICAT Endo	197
Modificar los ajustes de visualización	189	Cesta de la compra	
Visualizar o modificar información de la consulta	188	Abrir	173
Visualizar o modificar los ajustes generales.	184	Colocar EndoLines	136
Alineación de volumen	88	Utilizar botón del ratón	136
Ajustar	90		
Área de trabajo de radiografías intraorales		D	
Informaciones generales	63	Desinstalación	200
Área panorámica	89		
Ajustar	95	E	
Áreas de trabajo	60	EndoLine	
Ajustar	65	Ajustar color y texto	138
Cambiar	64	Añadir puntos de control	139
Crear capturas de pantalla	66	Borrar puntos de control	139
Panorámica	62	Desplazar puntos de control	139
Radiografía intraoral	63	Editar	136
Restablecer	65	EndoView	131
Asistente de EndoLine	125	Ajustar	136
Canal de perforación	125	Girar	132
Colocar EndoLines	136	Exportación de datos	165
EndoLine	125	Abrir la ventana "Transferir datos"	166
EndoView	131	Exportar datos	167
Orientar previamente la región dental	134		
Planificar canales de perforación	145	F	
Seleccionar diente	133	Flujo de trabajo	29
Vistas	126		
Asistente de registro	114	I	
Poner máscaras en áreas	123	Idiomas	15
Posicionar previamente la radiografía intraoral	115	Imagen de prueba SMPTE	186
Registrar la radiografía intraoral	117	Imágenes y capturas de pantalla para impresos	
		Ajustar herramientas de dibujo	160
B		Crear capturas de pantalla	161
Barra de herramientas del flujo de trabajo	49	Dibujar círculos	159
		Dibujar flechas	158
C		Importación en STL	105
Calibración del monitor	186	Importar	
Cambiar		Radiografías intraorales	111
Aplicaciones	37	Impresiones ópticas	98
Cambiar de aplicación	37	Importación en STL	105
Canales de perforación		Importar y registrar	100
Bloquear	145	Reutilizar a partir de otras aplicaciones SICAT	106
Desbloquear	145	Impresos	
Eliminar	145	Crear capturas de pantalla	161
Canjear códigos	47	Preparar	162
Capturas de pantalla		Producir	164
Crear a partir de vistas	81	Indicaciones	6
Crear para impreso	161	Información de seguridad	10
Realizar a partir de áreas de trabajo	66	Cualificación de los usuarios	12
		Niveles de peligro	11

Informar al paciente	157	Transferencia de datos en segundo plano	175
Instalación	17	Planificar canales de perforación	145
Desinstalación	200	Poner máscaras en áreas	123
Instrucciones de utilización		Portal SICAT	176
Abrir como ayuda online	38	Posicionar previamente la radiografía intraoral	115
Símbolos y estilos	13	Primeros pasos	29
Vista general	14		
Interfaz de usuario		R	
SICAT Endo	48	<hr/>	
SICAT Suite	35	Radiografía intraoral	
L		Asistente de registro	114
<hr/>		Posicionar previamente	115
Licencias	39	Registrar	117
Activar automáticamente	42	Radiografías intraorales	109
Activar manualmente	44	Asignar dientes	111
Canjear códigos	47	Importar	111
Devolver al pool de licencias	46	Número de diente	111
Mostrar	41	Sensores de radiografías intraorales compatibles	
		110	
M		Registrar la radiografía intraoral	117
<hr/>		Adaptar la orientación previa	120
Mediciones		Poner máscaras en áreas	123
Añadir mediciones de ángulos	153	Registrar y eliminar plugin	
Añadir mediciones de distancias	152	SIDEXIS XG	32
Desplazar	155	Requisitos del sistema	8
Desplazar lecturas	156		
Desplazar puntos de medición	155	S	
Vista general	151	<hr/>	
Métodos abreviados de teclado	199	Seleccionar diente	133
		Sensores de radiografías intraorales compatibles	110
O		Servicio de asistencia	191
<hr/>		Abrir ayuda	38
Objetos		Abrir la ventana de asistencia	192
Activar objetos y grupos de objetos	53	Contacto	193
Barra de herramientas del objeto	55	Herramientas	193
Barra de objetos	52	Información de producto	194
Contraer y expandir grupos de objetos	53	SICAT Endo	
Deshacer y rehacer	55	Interfaz de usuario	48
Eliminar	55	SICAT Suite	
Enfocar	55	Cerrar	198
Mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos	54	Iniciar	34
Objetos de SICAT Endo	56	Interfaz de usuario	35
Orientar previamente la región dental	134	SICAT WebConnector	177
		SIDEXIS XG	
P		Registrar y eliminar plugin	32
<hr/>			
Particularidades de esta versión	26	U	
Pasos del flujo de trabajo		<hr/>	
Preparar	49	Uso previsto	6
Pedido	168		
Carga automática tras un reinicio	178	V	
Colocar plantilla de perforación en la cesta de la compra	169	<hr/>	
Comprobar la cesta de la compra	174	Ventana de exploración	61
Interrumpir y continuar con la carga	178	Versiones	
Portal SICAT	176	Diferencias	26
Transferencia de datos a través de otro PC	179	Vista 3D	82
		Cambiar el modo de detalle	87
		Cambiar modo de visualización	84

Configurar	85
Modificar la posición	83
Vista general de SICAT Suite	15
Vistas	67
Aplicar el zoom	75
Asistente de EndoLine	126
Barra de herramientas de la vista	68
Brillo y contraste	73
Cambiar	70
Crear capturas de pantalla	81
Desplazar la ventana de exploración	78
Desplazar secciones	75
Desplazarse	76
EndoView	131
Maximizar y restablecer	72
Ocultar y mostrar la ventana de exploración	79
Restablecer	80
Retículos y marcos	77

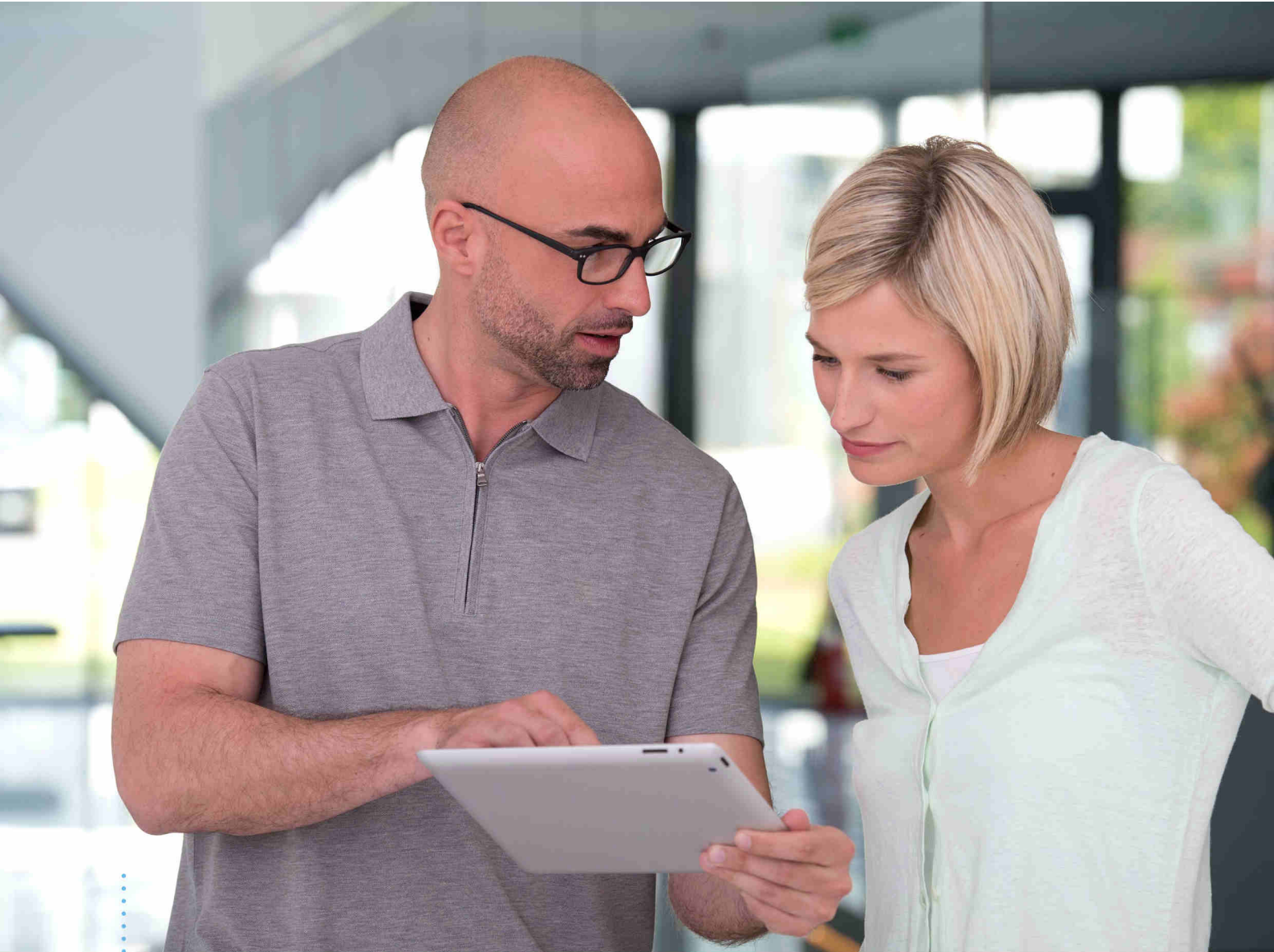

SICAT ENDO *VERSIÓN 1.4*

Instrucciones de utilización | Español | Standalone

ÍNDICE - Standalone

1	Usó previsto e indicaciones	6
2	Historial de versiones	7
3	Requisitos del sistema	8
4	Información de seguridad	10
4.1	Definición de los niveles de peligro	11
4.2	Cualificación de los usuarios	12
5	Símbolos y resaltes utilizados	13
6	Vista general de las instrucciones de utilización	14
7	Vista general de SICAT Suite	15
8	Instalar SICAT Suite	17
9	Llevar a cabo los pasos de la verificación tras la actualización del sistema operativo	23
10	Actualizar o reparar SICAT Suite	25
11	Particularidades de esta versión	26
12	Flujo de trabajo estándar de SICAT Endo	29
13	Iniciar SICAT Suite	33
14	Estudios SICAT Endo en SICAT Suite	34
15	La interfaz de usuario de SICAT Suite	37
15.1	Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"	39
16	Cambiar entre aplicaciones SICAT	41
17	Abrir las instrucciones de utilización	42
18	Licencias	43
18.1	Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"	45
18.2	Activar licencias mediante una conexión activa a Internet	46
18.3	Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet	48
18.4	Devolver licencias al pool de licencias	50
18.5	Canjear códigos	51
19	Archivadores de historias clínicas	52
19.1	Abrir la ventana "Archivadores de historias clínicas"	54
19.2	Añadir archivadores de historias clínicas	55
19.3	Activar otro archivador de historias clínicas	57
19.4	Eliminar archivadores de historias clínicas	59
20	Importación de datos	60
20.1	Formato DICOM compatible	62
20.2	Seleccionar los datos que desea importar	63
20.3	Seleccionar una opción de importación	65

20.4	Crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos	66
20.5	Asignar datos a una historia clínica existente	67
21	Historias clínicas	70
21.1	Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"	71
21.2	Buscar y clasificar historias clínicas en el archivador de historias clínicas	72
21.3	Activar historias clínicas	74
21.4	Trabajar con historias clínicas activas	75
21.5	Modificar los atributos de las historias clínicas.....	77
21.6	Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas	78
21.7	Estudios SICAT Endo en SICAT Suite.....	80
21.8	Cerrar las historias clínicas activas y guardar los proyectos de planificación contenidos	83
21.9	Eliminar historias clínicas de los archivadores de historias clínicas.....	84
21.10	Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas.....	86
22	La interfaz de usuario de SICAT Endo.....	88
22.1	Barra de herramientas del flujo de trabajo	89
22.2	Barra de objetos.....	92
22.3	Gestionar objetos con el navegador de objetos.....	93
22.4	Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto.....	95
22.5	Objetos de SICAT Endo	96
23	Áreas de trabajo	100
23.1	Vista general del área de trabajo panorámica.....	101
23.2	Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral	103
23.3	Cambiar el área de trabajo activa	104
23.4	Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo	105
23.5	Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo.....	106
24	Vistas	107
24.1	Ajustar las vistas.....	108
24.2	Cambiar la vista activa.....	110
24.3	Maximizar y restablecer vistas	112
24.4	Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D	113
24.5	Ampliar vistas y desplazar secciones.....	115
24.6	Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D.....	116
24.7	Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos	117
24.8	Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración.....	118
24.9	Restablecer vistas	120
24.10	Realizar capturas de pantalla de vistas	121
25	Adaptar la vista 3D.....	122
25.1	Modificar la posición de la vista 3D	123
25.2	Cambiar el modo de visualización de la vista 3D	124
25.3	Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D.....	125
25.4	Cambiar el modo de detalle de la vista 3D	127

26 Valores de gris	128
26.1 Ajustar valores de gris.....	130
27 Alineación de volumen y área panorámica	132
27.1 Ajustar la alineación del volumen.....	134
27.2 Ajustar el área panorámica.....	139
28 Impresiones ópticas	142
28.1 Importar y registrar impresiones ópticas.....	143
28.2 Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL.....	149
28.3 Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT.....	150
29 Radiografías intraorales	152
29.1 Sensores de radiografías intraorales compatibles.....	154
29.2 Importar radiografías intraorales y asignar dientes.....	155
30 Asistente de registro	158
30.1 Posicionar previamente la radiografía intraoral.....	159
30.2 Registrar la radiografía intraoral.....	161
30.3 Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial.....	164
30.4 Poner máscaras en áreas.....	167
31 Asistente de EndoLine	169
31.1 Vistas en el asistente de EndoLine.....	170
31.1.1 EndoView.....	175
31.1.2 Girar EndoView.....	176
31.2 Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento.....	177
31.3 Orientar previamente la región dental.....	178
31.4 Colocar EndoLines.....	180
31.5 Ajustar color y texto.....	182
31.6 Añadir, desplazar y borrar puntos de control.....	183
31.7 Girar la vista 3D.....	186
31.8 Mostrar impresiones ópticas en la vista 3D.....	187
31.9 Utilizar botón del ratón.....	188
31.10 Planificar canales de perforación.....	189
32 Mediciones de distancias y ángulos	195
32.1 Añadir mediciones de distancias.....	196
32.2 Añadir mediciones de ángulos.....	197
32.3 Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas.....	199
33 Informar al paciente	201
33.1 Crear imágenes y capturas de pantalla.....	202
33.2 Preparar impresos.....	205
33.3 Generar impresos.....	207
34 Exportación de datos	208
34.1 Abrir la ventana "Transferir datos".....	209
34.2 Exportar datos.....	210

35 Proceso de pedido	211
35.1 Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra.....	212
35.2 Abrir la cesta de la compra	216
35.3 Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido.....	217
35.4 Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet	218
35.5 Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT.....	219
35.6 SICAT WebConnector.....	220
35.7 Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet.....	222
36 Ajustes.....	226
36.1 Utilizar ajustes generales.....	227
36.2 Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE	229
36.3 Utilizar información de la consulta	231
36.4 Modificar los ajustes de visualización.....	232
37 Servicio de asistencia.....	234
37.1 Abrir opciones de asistencia.....	235
37.2 Información de contacto y herramientas de ayuda	236
37.3 Información	237
38 Abrir datos protegidos contra escritura	238
39 Cerrar SICAT Endo	240
40 Cerrar SICAT Suite	241
41 Métodos abreviados de teclado.....	242
42 Desinstalar SICAT Suite	243
43 Notas sobre seguridad	245
44 Precisión.....	252
Glosario	253
Índice alfabético.....	255
Explicación sobre las identificaciones	258

1 *USO PREVISTO E INDICACIONES*

SICAT Endo es un software para visualizar la información de imágenes del área oral-maxilofacial. La información de las imágenes procede de escáneres médicos como, por ejemplo, escáneres TC y TVD. Además, SICAT Endo ayuda al dentista a planificar, evaluar y comparar opciones terapéuticas y vías de acceso para tratamientos de endodoncia. Los datos de planificación generados por el dentista pueden exportarse desde SICAT Endo y utilizarse para llevar a cabo el tratamiento.

INDICACIONES

SICAT Endo es una aplicación de software para:

- Ayuda al diagnóstico en el área oral-maxilofacial
- Ayuda en la comparación de diferentes opciones terapéuticas
- Ayuda en la planificación del tratamiento de la endodoncia
- Ayuda a la planificación del tratamiento para plantillas de perforación endodónticas

2 *HISTORIAL DE VERSIONES*

VERSIÓN 1.4

- Versión inicial

3 REQUISITOS DEL SISTEMA



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

Procesador	Quad Core 2,3 GHz
Memoria de trabajo	8 GB
Tarjeta gráfica	Específica* DirectX 11 o superior 2 GB de memoria gráfica Controlador actual compatible como mínimo con WDDM 1.0
Pantalla	Resolución mínima de 1920 × 1080 píxeles con un escalado del 100 al 125%** Resolución máxima de 3840 × 2160 píxeles con un escalado del 100 al 200%
Memoria libre en el disco duro	20 GB y espacio adicional para juegos de datos
Medios de almacenamiento	Acceso a medio de almacenamiento externo que contiene los archivos de instalación.
Dispositivos de entrada	Teclado, ratón
Red	Ethernet, 100 Mbits/s, se recomiendan 1000 Mbits/s
Impresora para la hoja de información del paciente	300 dpi como mínimo Formato de papel DIN A4 o US Letter
Sistema operativo	Windows 7 SP1 (64 bits) con KB2670838 Windows 8 (64 bits, escritorio) Windows 8.1 (64 bits, escritorio) Windows 10 (64 bits, escritorio)
Navegador web	Microsoft Internet Explorer 11 o superior Mozilla Firefox 39 o superior Google Chrome 44 o superior JavaScript debe estar activado. Debe seleccionarse el navegador estándar.
Visor de PDF	Por ejemplo, Adobe Reader DC o superior
SIDEXIS XG con SICAT Suite como plugin	Versión 2.6.1 (64 bits)

SIDEXIS 4 con SICAT Suite como módulo	Versión 4.2 SiPlanAPI V4
SIDEXIS 4 con SICAT Suite como plugin	Versión 4.1.2 (64 bits)



*SICAT Suite solo es compatible con tarjetas gráficas dedicadas que tengan un rendimiento igual o superior a la NVIDIA GeForce 960 GTX. Las tarjetas gráficas integradas no son compatibles.

**La combinación de una baja resolución de pantalla y un alto nivel de escalado puede hacer que el software muestre de manera incompleta determinadas partes de la superficie.

La pantalla debe ajustarse de tal manera que muestre correctamente la imagen de prueba SMPTE. Encontrará más información al respecto en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [▶ *Página 229 - Standalone*].

REQUISITOS DE SOFTWARE

SICAT Suite necesita los siguientes componentes de software y los instala si no están ya disponibles:

- Microsoft .NET Framework 4.5
- Software de administración de licencias CodeMeter 6.30d
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Los puertos deben estar autorizados en su cortafuegos:

PROTOCOLO	DIRECCIÓN DE LA CONEXIÓN	PUERTO
HTTP	Saliente	80
HTTPS	Saliente	443
FTPS - Dirección	Saliente	21
FTPS - Transferencia de datos	Saliente	49152-65534



Puede también realizar pedidos sin el SICAT WebConnector. Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 211 - Standalone*].

4 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Es importante que lea los siguientes capítulos relativos a la seguridad:

- *Definición de los niveles de peligro* [▶ *Página 11 - Standalone*]
- *Cualificación de los usuarios* [▶ *Página 12 - Standalone*]
- *Notas sobre seguridad* [▶ *Página 245 - Standalone*]

4.1 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO

En las presentes instrucciones de utilización se utilizan las siguientes identificaciones de seguridad para evitar lesiones de los usuarios o pacientes y daños materiales:



PRECAUCIÓN

Identifica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como consecuencia pequeñas lesiones.

NOTA

Identifica información que se considera importante, pero no relevante para la seguridad.

4.2 CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



PRECAUCIÓN

El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

Solo el personal con la formación apropiada o debidamente capacitado puede usar el software.

Si lleva a cabo una capacitación o un curso o usa este software en el marco de un curso general, podrá emplear el software solo bajo la supervisión permanente de una persona cualificada.

Para usar el software debe cumplir los siguientes requisitos:

- Haber leído las instrucciones de utilización.
- Estar familiarizado con la estructura básica y las funciones del software.
- Estar en condiciones de detectar fallos de funcionamiento del software y aplicar los pasos adecuados en caso necesario.

5 SÍMBOLOS Y RESALTES UTILIZADOS

SÍMBOLOS

Las presentes instrucciones de utilización emplean el siguiente símbolo:



El símbolo de nota identifica información adicional como, por ejemplo, formas de proceder alternativas.

RESALTES

Los textos y las denominaciones de elementos que presenta SICAT Suite aparecen destacados con fuente **negrita**. Esto incluye los siguientes objetos en la interfaz de usuario:

- Denominaciones de áreas
- Denominaciones de botones
- Denominaciones de símbolos
- Textos de notas y mensajes en la pantalla

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Las instrucciones de operación aparecen en forma de listas numeradas:

- ☑ Los requisitos se identifican con este símbolo.
- 1. Los pasos se identifican con números.
 - ▶ Los resultados intermedios se identifican con este símbolo y están sangrados.
- 2. Después de los resultados intermedios hay más pasos.
 - ▶ Los resultados finales se identifican con este símbolo.
 - Una instrucción que solo consta de un paso se identifica con este símbolo.

6 VISTA GENERAL DE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

SICAT Endo forma parte de SICAT Suite junto con otras aplicaciones.

SICAT Suite es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones SICAT. Por consiguiente, las aplicaciones se instalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - Standalone*].

Actualmente SICAT Suite está disponible en tres variantes. Algunas operaciones de manejo son diferentes en función de la variante. Por eso las presentes instrucciones de utilización tratan las variantes de forma separada:

- Módulo de SIDEXIS 4
- Plugin de SIDEXIS XG
- Versión independiente

No es necesario que elija una variante cuando instale SICAT Suite.

Las aplicaciones también se desinstalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Desinstalar SICAT Suite* [▶ *Página 243 - Standalone*].

7 VISTA GENERAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

- SICAT Function: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Function en las Instrucciones de utilización de SICAT Function.
- SICAT Air: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Air en las Instrucciones de utilización de SICAT Air.
- SICAT Endo: encontrará información sobre el uso previsto de SICAT Endo en las Instrucciones de utilización de SICAT Endo.

IDIOMAS

SICAT Suite es compatible con los siguientes idiomas en la interfaz de usuario:

- Inglés
- Alemán
- Francés
- Japonés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Portugués
- Ruso

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Para activar una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en PC en los que esté instalado SICAT Suite.

VERSIÓN COMPLETA Y MODO VIEWER

SICAT Suite puede iniciarse en dos modos diferentes:

- Si ha activado la licencia del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en el modo Viewer.
- Si ha activado la licencia completa del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en su versión completa.

En general, se aplica lo siguiente:

- Las aplicaciones con licencia completa activada se inician en su versión completa.
- Las aplicaciones con la licencia del Viewer activada se inician en el modo Viewer.
- Las aplicaciones sin licencia activada no se inician.
- No es necesario que elija un modo cuando instale SICAT Suite.

8 INSTALAR SICAT SUITE

 **PRECAUCIÓN**

Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.

 **PRECAUCIÓN**

Los medios de instalación dañados podrían hacer que la instalación fallara.

Trate los medios de instalación con cuidado y almacénelos de forma adecuada.

 **PRECAUCIÓN**

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

 **PRECAUCIÓN**

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.



La función **Autoarranque** de Windows podría estar desconectada en su PC. En ese caso, puede abrir el medio óptico en el explorador de archivos de Windows e iniciar manualmente el archivo **SICATSuiteSetup.exe**, que contiene en su nombre la versión de SICAT Suite.

Para instalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

Su PC cumple los requisitos del sistema. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [[▶ Página 8 - Standalone](#)].

1. Introduzca el medio de instalación de SICAT Suite en la unidad de disco óptica de su PC.

▶ Se abre la ventana **Autoarranque**.

2. En la ventana **Autoarranque**, seleccione la opción **Ejecutar SICATSuiteSetup.exe**, que contiene en su nombre la versión de SICAT Suite.

▶ Los requisitos de software se instalan si no están ya disponibles en el PC.



- El programa de instalación de SICAT Suite se inicia y la ventana **INTRODUCCIÓN** se abre:



3. Seleccione el idioma que desee para el programa de instalación de SICAT Suite en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **ACUERDO DE LICENCIA**:




4. Lea el contrato de licencia de usuario final en su totalidad, seleccione la casilla de comprobación **Acepto el acuerdo de licencia** y haga clic en **Continuar**.

► Se abre la ventana **OPCIONES**:



5. Para cambiar la carpeta del disco duro donde el programa de instalación de SICAT Suite instala SICAT Suite, haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.
6. Navegue hasta la carpeta deseada en la que el programa de instalación de SICAT Suite tenga que crear el directorio «SICAT Suite» y haga clic en **OK**.
 - El programa de instalación de SICAT Suite inserta la ruta de la carpeta seleccionada en el campo **¿Dónde desea instalar el software**.
7. Si SIDEXIS XG o SIDEXIS 4 está instalado en su PC, la casilla de comprobación **Deseo utilizar SICAT Suite con SIDEXIS** está disponible. Durante la instalación o más adelante, SICAT Suite puede registrarse manualmente como plugin de SIDEXIS XG o como módulo de SIDEXIS 4.
 - Si la casilla de comprobación **Deseo utilizar SICAT Suite con SIDEXIS** está activada, la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio** no está disponible.
8. Si está disponible, active o desactive la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio**.
9. Haga clic en el botón **Instalar**.

- ▶ Se abre la ventana **PROGRESO**:

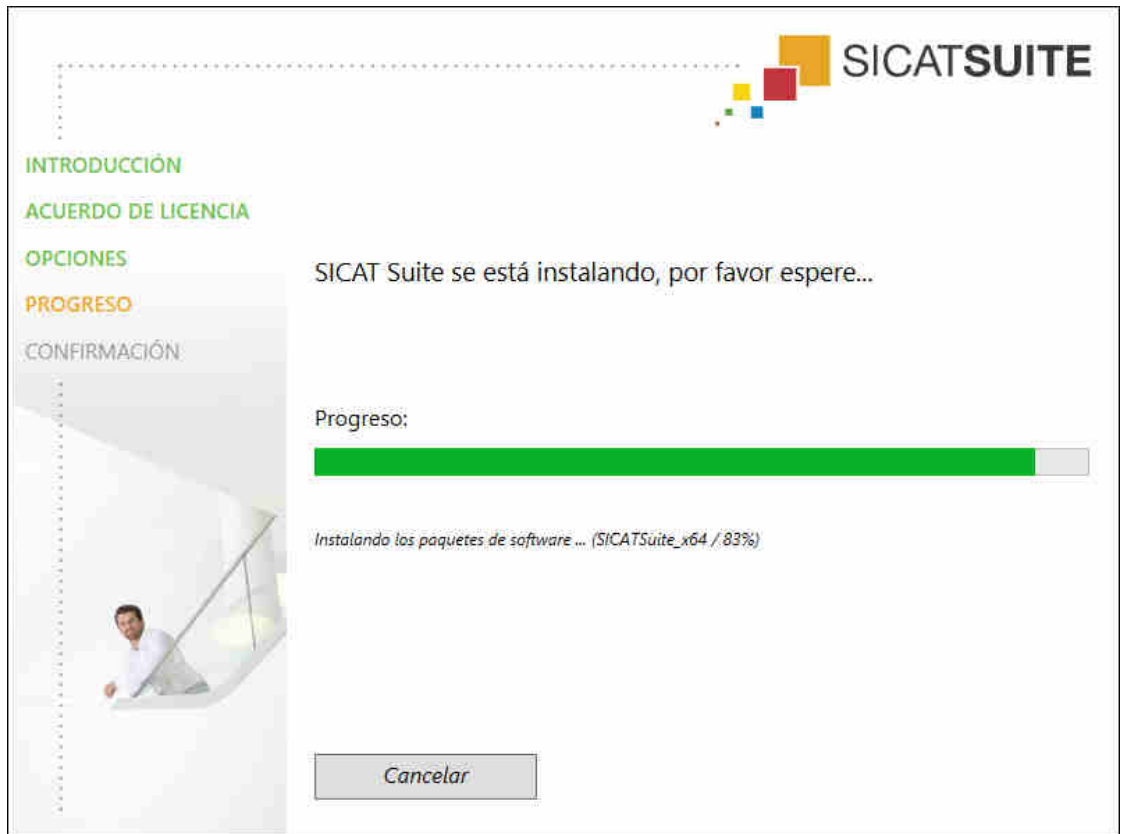

- ▶ Se instalan SICAT Suite y los requisitos de software restantes.
- ▶ Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**:



10. Haga clic en el botón **Finalizar**.

▶ El programa de instalación de SICAT Suite se cierra.

9 LLEVAR A CABO LOS PASOS DE LA VERIFICACIÓN TRAS LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO


PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones, deberá asegurar que SICAT Endo funcione sin problemas. Lleve a cabo los siguientes pasos de la verificación. Si detecta diferencias en un paso de la verificación, impida el que se siga usando SICAT Endo en el PC afectado y póngase en contacto con la asistencia SICAT.


PREPARATIVOS

1. Parar asegurar que nadie haya realizado cambios de forma accidental, elimine el paciente «Patient Axx».
2. Importe el juego de datos de referencia del archivo «SICATSuite_ReferenceDataset_1.4.zip». Encontrará el juego de datos en el medio de instalación de SICAT Suite.
3. Abra el juego de datos de referencia «Patient Axx» en SICAT Endo.


ENDOLINE

1. Asegúrese de que el odontograma **FDI** esté activo. Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 227 - Standalone*].
2. Asegúrese de que el área de trabajo **Panorámica** esté activa.
3. Restablezca las vistas a los valores estándar.
4. En el **Navegador de objetos**, abra el grupo «**Diente 45**».
5. En el **Navegador de objetos**, seleccione el elemento «15,24 mm n.º diente 45» y enfóquelo.

6. Compare la vista **Longitudinal** con la siguiente captura de pantalla:

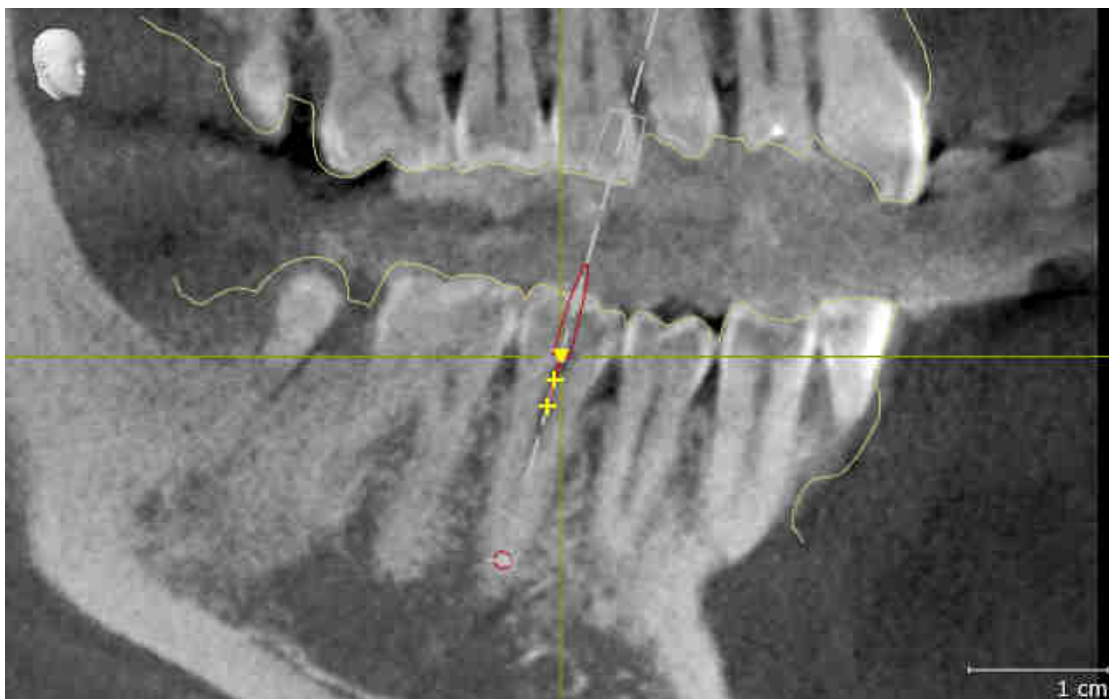

7. En el **Navegador de objetos**, abra el grupo «**Diente 25**».
8. En el **Navegador de objetos**, seleccione el elemento «13,63 mm n.º diente 25» y enfóquelo.
9. Compare la vista **Transversal** con la siguiente captura de pantalla:

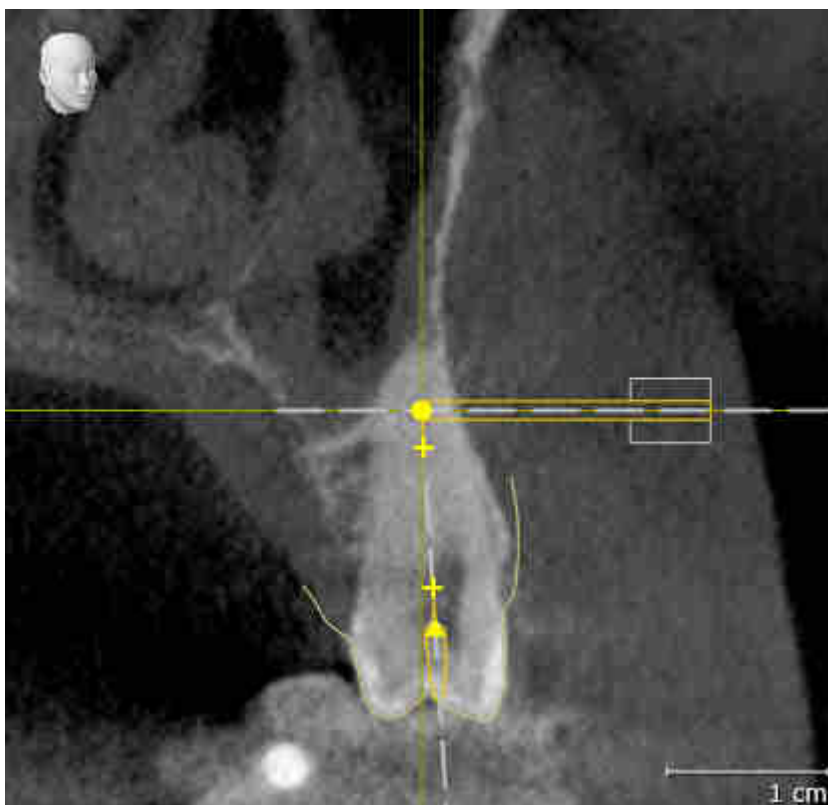

10 ACTUALIZAR O REPARAR SICAT SUITE

ACTUALIZAR SICAT SUITE

Puede actualizar SICAT Suite iniciando el programa de instalación de SICAT Suite y haciendo clic en el botón **Actualizar**. El programa de instalación desinstala primero la versión antigua de SICAT Suite. Todos los datos y los ajustes se conservan.



Una nueva versión de la versión independiente de SICAT Suite necesita archivadores de historias clínicas actualizados. Al iniciar por primera vez la nueva versión o activar un archivador de historias clínicas obsoleto, SICAT Suite pregunta al usuario si desea actualizar el archivador. Si se confirma el mensaje, SICAT Suite actualiza automáticamente el archivador de historias clínicas. **¡PRECAUCIÓN! Los archivadores de historias clínicas actualizados ya no pueden utilizarse con versiones antiguas de SICAT Suite.**



Si SIDEXIS XG se actualiza a SIDEXIS 4.1.3 o superior y después se actualiza SICAT Suite, el instalador de SICAT Suite registra SICAT Suite como módulo SIDEXIS 4. Cuando se abre una radiografía 3D, SICAT Suite comprueba si en SIDEXIS XG hay estudios sobre esa radiografía 3D y los traslada de SIDEXIS XG a SIDEXIS 4.

REPARAR SICAT SUITE

Puede reparar SICAT Suite iniciando el programa de instalación de SICAT Suite y haciendo clic en el botón **Reparar**. Todos los datos y los ajustes se conservan.

Tanto la actualización como la reparación de SICAT Suite utilizan el programa de instalación de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - Standalone*].

11 PARTICULARIDADES DE ESTA VERSIÓN

Dependiendo de si utiliza SICAT Endo de forma independiente o conectado a otro software, existen diferencias en algunas áreas.

DATOS DE PACIENTE Y DATOS DE VOLUMEN

La versión independiente de SICAT Suite incluye su propia administración central de historias clínicas y datos de volumen. El concepto de las historias clínicas en la versión independiente de SICAT Suite puede compararse con las historias clínicas clásicas:

- Las historias clínicas se guardan en archivadores de historias clínicas, que pueden compararse con archivadores.
- Activar una historia clínica puede compararse con sacar una historia clínica de un archivador y ponerla sobre la mesa.
- Abrir los datos del paciente de la historia clínica en aplicaciones SICAT puede compararse con sacar hojas de la historia clínica.
- Añadir radiografías 3D a una historia clínica puede compararse con añadir radiografías 2D a una historia clínica clásica.
- Una radiografía 3D puede ser la base de varios proyectos de planificación. Los proyectos de planificación también forman parte de una historia clínica.
- Una radiografía 3D junto con los proyectos de planificación correspondientes se denomina estudio.

Encontrará más información sobre la administración de archivadores de historias clínicas en *Archivadores de historias clínicas* [▶ *Página 52 - Standalone*]. Encontrará más información sobre la administración de historias clínicas en *Historias clínicas* [▶ *Página 70 - Standalone*].



Además de los datos de paciente, también deben guardarse los parámetros de usuario de las aplicaciones SICAT. Los parámetros definidos por cada usuario se encuentran en dos directorios independientes. Para abrir estos directorios, introduzca **%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG** y **%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG** en la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows.

AJUSTES

En la versión independiente, SICAT Suite administra todos los ajustes. Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 226 - Standalone*].

LICENCIAS

La versión independiente y las versiones de SICAT Suite integradas en otro software utilizan las mismas licencias. No es necesario que elija una versión cuando instale SICAT Suite.

ABRIR ESTUDIOS CON Y SIN DERECHOS DE ESCRITURA

Para poder realizar y guardar cambios en estudios SICAT Endo, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe estar activada una licencia completa de SICAT Endo.
- Debe estar activado un archivador de historias clínicas.

De lo contrario, no es posible realizar y guardar cambios de estudios SICAT Endo. Si ha activado una licencia del Viewer para SICAT Endo, puede ver radiografías 3D y estudios de SICAT Endo.

La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles cuando están activados una licencia de aplicación SICAT y un archivador de historias clínicas:

FUNCIÓN	LICENCIA ILIMITADA DE APLICACIÓN Y ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVADOS	LICENCIA VIEWER DE APLICACIÓN Y NINGÚN ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVADO	LICENCIA DE APLICACIÓN Y ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS NO ACTIVADOS
Área de servicio de asistencia	Sí	Sí	Sí
Ajustes generales	Sí	Sí	Sí
Exportación de datos	Sí	No	No
Gestión de los archivadores de historias clínicas	Sí	No	No
Gestión de las historias clínicas	Sí	No	No
Importación de datos	Sí	No	No
Ayuda	Sí	Sí	Sí

La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles cuando están activados una licencia SICAT Endo y un archivador de historias clínicas:

FUNCIÓN	SICAT ENDO-LICENCIA COMPLETA DE APLICACIÓN Y ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVADOS	SICAT ENDO-LICENCIA DEL VIEWER Y ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVADOS	LICENCIA SICAT ENDO Y ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS NO ACTIVADOS
Realizar cambios en estudios SICAT Endo	Sí	No	No
Abrir datos en el modo Viewer	No	Sí	No

En determinadas circunstancias no es posible realizar ni guardar cambios de estudios SICAT Endo aun estando activada una licencia de aplicación. La causa puede ser, por ejemplo, un proceso de pedido en curso.

En la versión independiente, el estado de licencia también influye en las funciones disponibles en la ventana **SICAT Suite Home**. Encontrará información sobre ello en *Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"* [▶ *Página 39 - Standalone*].

Encontrará más información en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 238 - Standalone*].

12 FLUJO DE TRABAJO ESTÁNDAR DE SICAT ENDO


PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.


PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.


PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.



Antes de empezar a trabajar con SICAT Suite, es importante que haya leído la totalidad de las presentes instrucciones de utilización y, en especial, todas las notas sobre seguridad. Tenga las presentes las instrucciones de utilización a mano para futuras búsquedas de información.

INSTALACIÓN

Encontrará la manera de instalar SICAT Suite en *Instalar SICAT Suite* [► *Página 17 - Standalone*].

HABILITAR VERSIÓN COMPLETA

1. Si ha adquirido una licencia para SICAT Endo, active la licencia para habilitar la versión completa. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [► *Página 43 - Standalone*].
2. Para poder guardar sus datos, cree al menos un archivador de historias clínicas y actívelo. Encontrará información sobre ello en *Archivadores de historias clínicas* [► *Página 52 - Standalone*].



Si no ha adquirido ninguna licencia para SICAT Endo, abra una única radiografía 3D en el modo Viewer. Encontrará más información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [► *Página 238 - Standalone*].



Si el PC en el que se ejecuta SICAT Suite se encuentra en un entorno de red y la configuración de red lo permite, puede guardar los archivadores de historias clínicas y las historias clínicas que estos contienen en un sistema de archivos en red. Para ello, normalmente el sistema de archivos en red debe ser compatible con el protocolo NFS o el protocolo SMB. Encontrará más información al respecto en *Archivadores de historias clínicas* [► *Página 52 - Standalone*].

INICIO

Encontrará la manera de iniciar SICAT Suite en *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 33 - Standalone*].

AJUSTES

Modifique los ajustes deseados en el área **Ajustes**. Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 226 - Standalone*].

JUEGOS DE DATOS

SICAT Endo Combina tres tipos de archivos diferentes entre sí.

- Radiografías 3D, por ejemplo de Sirona GALILEOS
- Radiografías intraorales, por ejemplo de Sirona XIOS XG
- impresiones ópticas digitales, por ejemplo de Sirona CEREC.


CAPTURAR JUEGOS DE DATOS

1. Elabore una radiografía intraoral del paciente en caso necesario. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.
2. Elabore una radiografía 3D del paciente. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.
3. Efectúe impresiones ópticas digitales del maxilar o de la mandíbula. Encontrará información al respecto en las instrucciones de utilización del equipo correspondiente.

ABRA UN JUEGO DE DATOS

1. Importe la radiografía 3D al archivador de historias clínicas. Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [▶ *Página 60 - Standalone*].
2. Para buscar historias clínicas y administrar datos importados, siga las instrucciones que encontrará en *Historias clínicas* [▶ *Página 70 - Standalone*].
3. Para trabajar con datos de historias clínicas, abra una historia clínica en SICAT Endo. Encontrará información sobre ello en *Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas* [▶ *Página 78 - Standalone*].

TÍPICO FLUJO DE TRABAJO DE LA ENDODONCIA DIGITAL

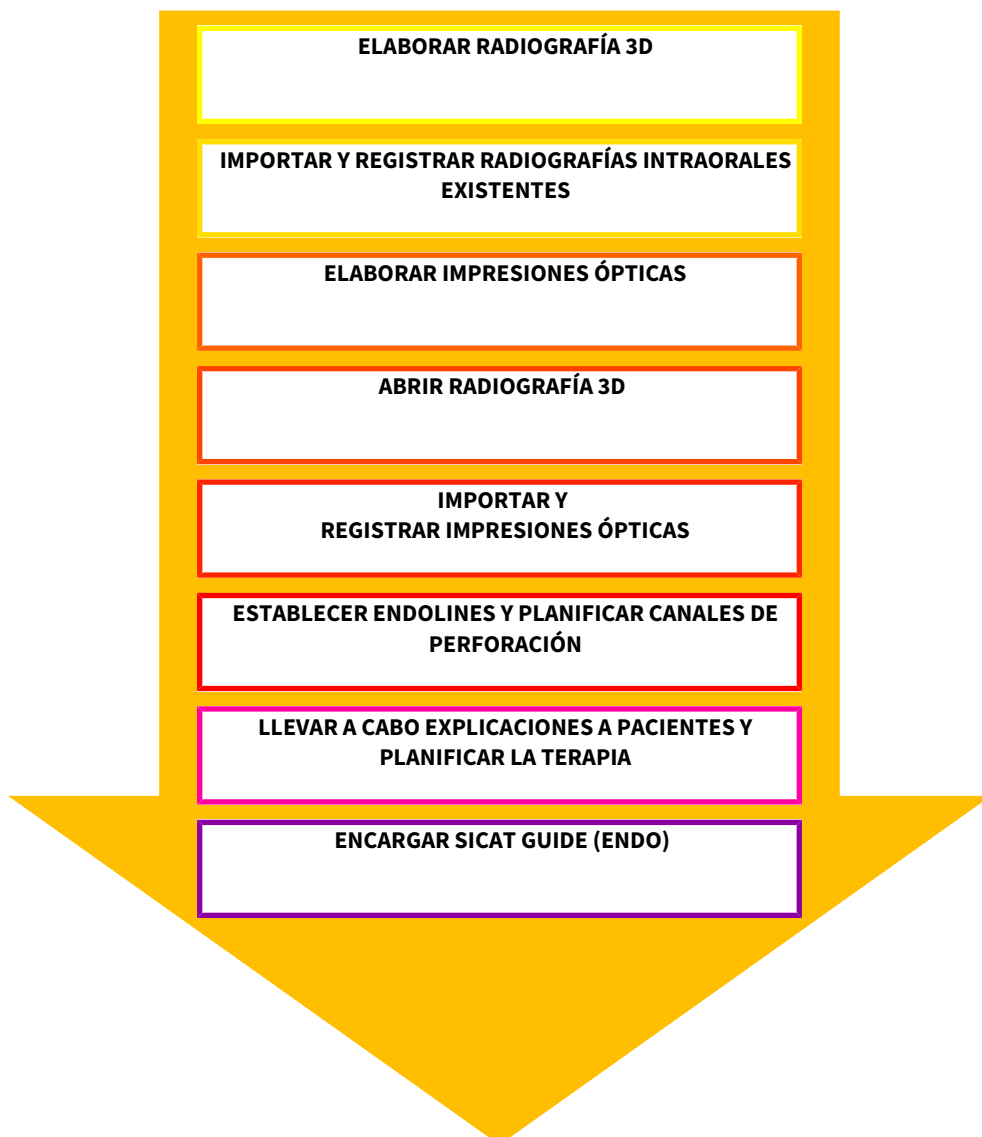

PASOS DE TRABAJO EN SICAT ENDO

1. Si es necesario, adapte la alineación del volumen y el área panorámica. Encontrará información sobre ello en *Alineación de volumen y área panorámica* [▶ *Página 132 - Standalone*].
2. Importe y registre las radiografías intraorales existentes en SICAT Endo. Encontrará información al respecto en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 155 - Standalone*] y *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 161 - Standalone*].
3. Importe y registre las impresiones ópticas con los datos de la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 143 - Standalone*].
4. Coloque EndoLines y planifique canales de perforación. Encontrará información al respecto en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 178 - Standalone*], *Colocar EndoLines* [▶ *Página 180 - Standalone*] y *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 189 - Standalone*].

5. Evalúe los objetos planificados Endo en el área de trabajo **Radiografía intraoral**. Encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral* [▶ *Página 103 - Standalone*].
6. Cree un impreso e informe al paciente. Encontrará información sobre ello en *Informar al paciente* [▶ *Página 201 - Standalone*].
7. Solicite una plantilla de perforación SICAT GUIDE (ENDO). Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 211 - Standalone*].
8. Exporte datos, por ejemplo, para pedir una segunda opinión. Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 208 - Standalone*].

TERMINAR O INTERRUMPIR EL TRABAJO CON EL JUEGO DE DATOS

- Para terminar o interrumpir su trabajo, guárdelo cerrando las historias clínicas activas. Encontrará información sobre ello en *Cerrar SICAT Suite* [▶ *Página 241 - Standalone*].

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA

Las instrucciones de utilización se encuentran en la ventana **Ayuda SICAT Suite**. Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 42 - Standalone*].

Encontrará más temas de ayuda en el área **Servicio de asistencia**. Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 234 - Standalone*].

13 INICIAR SICAT SUITE

Para iniciar SICAT Endo, en primer lugar debe iniciar SICAT Suite.


Para iniciar SICAT Suite, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT Suite ya se ha instalado correctamente. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 17 - Standalone*].



- Si se ha creado un acceso directo en el escritorio durante la instalación, haga clic en el símbolo **SICAT Suite** en el escritorio de Windows.
- ▶ SICAT Suite se inicia y se abre la ventana **SICAT Suite Home**. Encontrará información sobre ello en *Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"* [▶ *Página 39 - Standalone*].

También puede iniciar SICAT Suite pulsando la tecla **Windows**, escribiendo **SICAT Suite** y haciendo clic en el símbolo **SICAT Suite**.

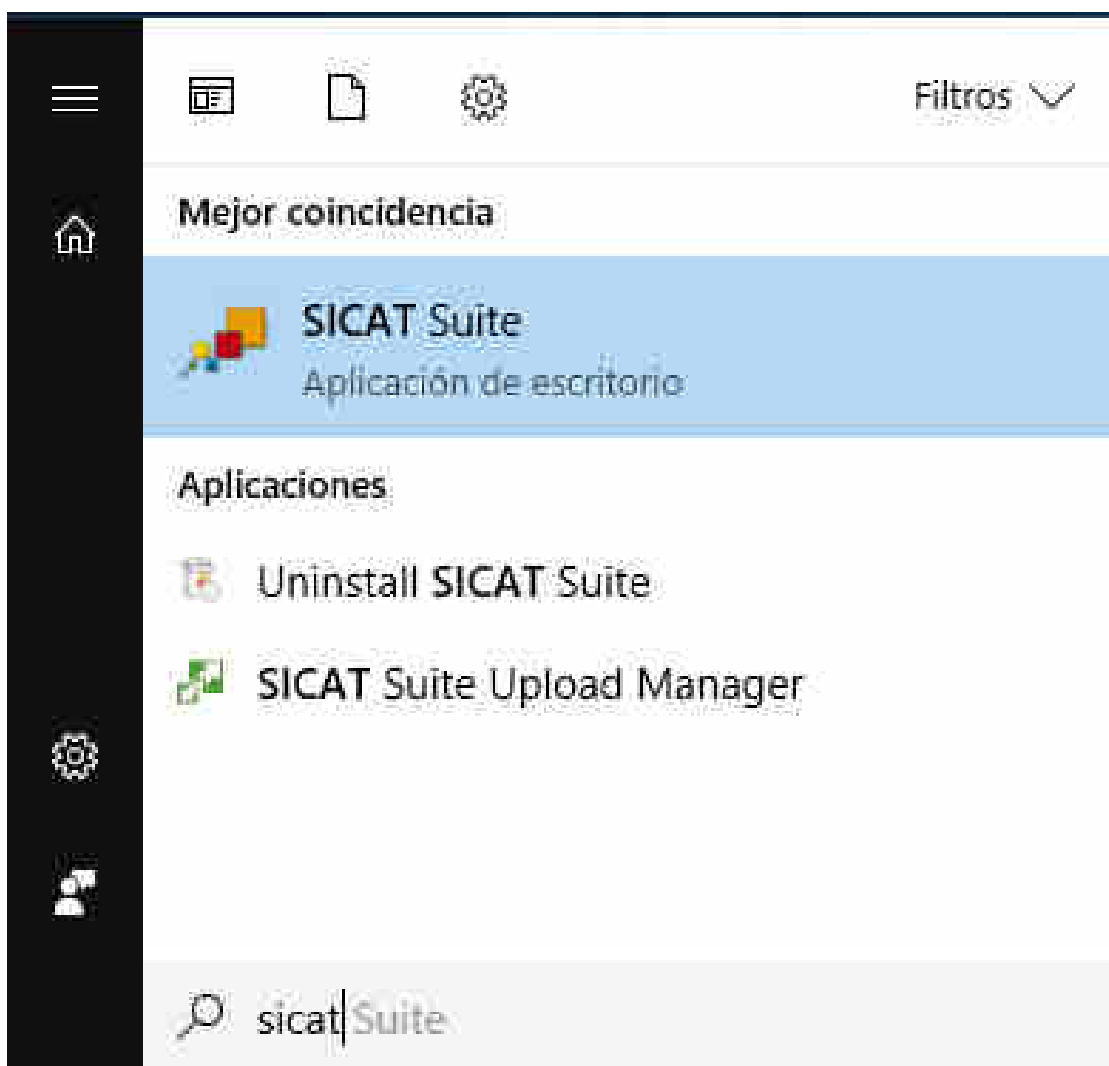

14 ESTUDIOS SICAT ENDO EN SICAT SUITE



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.




PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

La **Vista general de historias clínicas** muestra información de estudios de SICAT Endo si se cumplen las siguientes condiciones:

- SICAT Suite se utiliza como versión independiente.
- Se ha seleccionado un estudio de SICAT Endo en el área **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**:

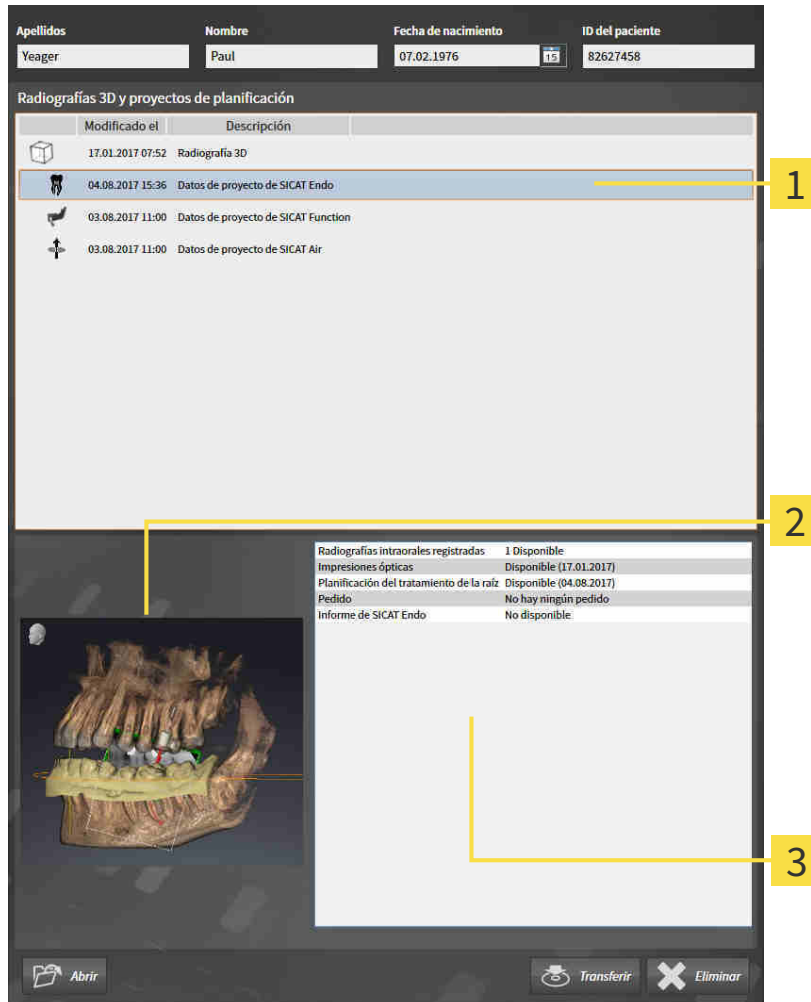


1 Estudio de SICAT Endo seleccionado

2 Área **Vista general**

3 Área **Detalles**

El área **Vista general** muestra la vista **3D**:

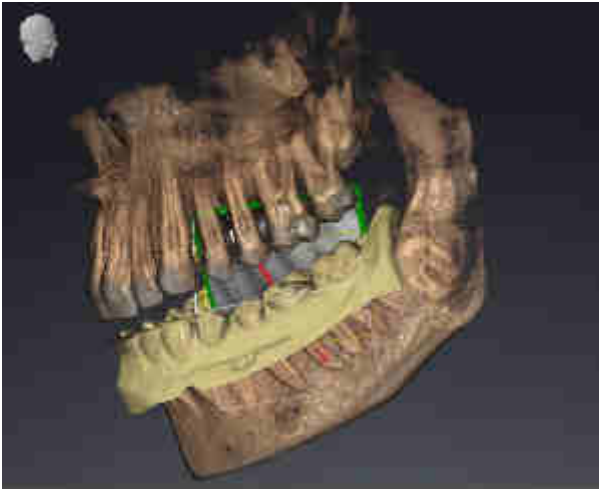


El área **Detalles** muestra la siguiente información:

- Disponibilidad de las radiografías intraorales registradas
- Disponibilidad de impresiones ópticas
- Disponibilidad de una planificación para el tratamiento del canal de la raíz
- Disponibilidad de un pedido con estado y fecha.
- Disponibilidad de un informe

15 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT SUITE

La interfaz de usuario de SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

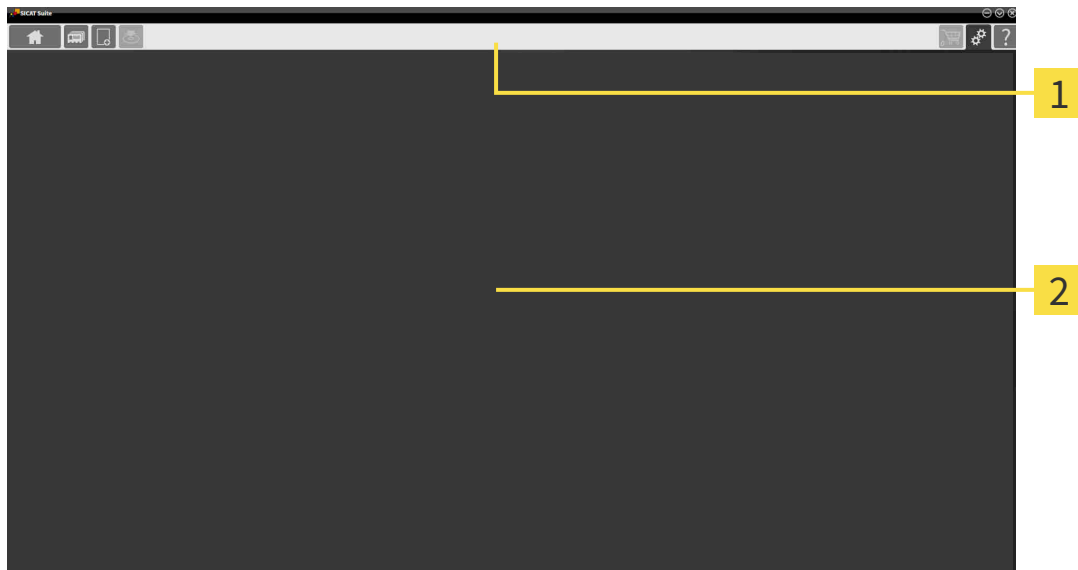

1 Barra de exploración

2 Área de aplicaciones

- La barra de exploración situada en el extremo superior de SICAT Suite muestra pestañas que permiten cambiar entre diferentes ventanas y aplicaciones.
- El **Área de aplicaciones** que se encuentra en la parte restante de SICAT Suite muestra la interfaz de usuario de la aplicación SICAT activa.

La **Barra de exploración** se compone de tres áreas distintas. El área de la parte izquierda y el área de la parte derecha siempre son visibles. SICAT Suite muestra el área situada en el centro solo si hay una historia clínica activada en ese momento.

El área situada en la parte izquierda contiene las siguientes pestañas:



- **SICAT Suite Home** - Encontrará información sobre ello en *Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"* [▶ *Página 39 - Standalone*].



- **Historias clínicas** - Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ *Página 70 - Standalone*].



- **Añadir datos nuevos** - Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [▶ *Página 60 - Standalone*].



- **Transferir datos** - Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 208 - Standalone*].

El área situada en el centro contiene las siguientes pestañas:



- **Historias clínicas activas** - Encontrará información sobre ello en *Trabajar con historias clínicas activas* [▶ *Página 75 - Standalone*].

- **Aplicaciones** - Encontrará información sobre ello en *Cambiar entre aplicaciones SICAT* [▶ *Página 41 - Standalone*].



El área situada en la parte derecha contiene las siguientes pestañas:



- **Cesta de la compra** - Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 211 - Standalone*].




- **Ajustes** - Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 226 - Standalone*].



- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 234 - Standalone*].

15.1 VISTA GENERAL DE LA VENTANA "SICAT SUITE HOME"

La ventana **SICAT Suite Home** le da la bienvenida cuando inicia la versión independiente de SICAT Suite:

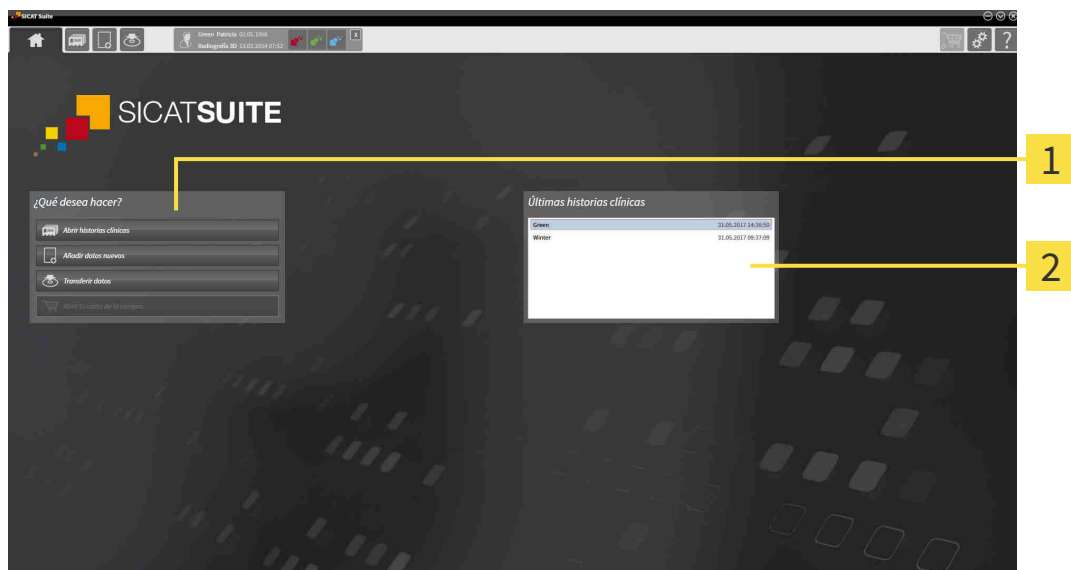

1 Área **¿Qué desea hacer**

2 Área **Últimas historias clínicas**



Puede volver a esta ventana en cualquier momento haciendo clic en el símbolo **SICAT Suite Home**. El contenido de la ventana **SICAT Suite Home** depende de los siguientes parámetros:

- Estado de la activación y clases de licencias
- Estado de los archivadores de historias clínicas

Si no hay ninguna licencia activada, la ventana **SICAT Suite Home** solo muestra un texto de indicación y el botón **Activar licencia**.

Si está activada la licencia del Viewer de al menos una aplicación de SICAT pero no hay ninguna versión completa activada de una aplicación de SICAT, SICAT Suite se ejecuta en el modo Viewer. En ese modo no puede establecer ninguna conexión con archivadores de historias clínicas ni crear ningún archivador de historias clínicas y las funciones para importar, editar y guardar datos de pacientes no están disponibles. Por eso, en la ventana **SICAT Suite Home** solo están disponibles el botón **Ver datos nuevos** y el botón **Activar licencia**.

Si hay una licencia completa activada, pero no se ha creado ni activado ningún archivador de historias clínicas en SICAT Suite, puede crear archivadores de historias clínicas, pero las funciones para importar, editar y guardar datos del paciente no están disponibles. Por eso, en la ventana **SICAT Suite Home** solo están disponibles el botón **Ver datos nuevos** y el botón **Configurar archivador de historias clínicas**.

Si hay una licencia completa activada y se ha creado y activado un archivador de historias clínicas en SICAT Suite, en el área **¿Qué desea hacer** de la ventana **SICAT Suite Home** están disponibles los siguientes botones:



- **Abrir** - Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ *Página 70 - Standalone*].



- **Añadir datos nuevos** - Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [▶ *Página 60 - Standalone*].



- **Transferir datos** - Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 208 - Standalone*].



- **Cesta de la compra** - Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 211 - Standalone*].

- Además, el área **Últimas historias clínicas** muestra una lista de las últimas historias clínicas abiertas. Puede hacer doble clic en esas historias clínicas para abrirlas.



Si está activo el ajuste **Mostrar información de pacientes anonimizada**, la ventana **SICAT Suite Home** oculta el área **Últimas historias clínicas**.

16 CAMBIAR ENTRE APLICACIONES SICAT

Para cambiar entre distintas aplicaciones de SICAT, haga lo siguiente:



- En la **Barra de exploración**, haga clic en el botón que tenga el nombre de la aplicación SICAT deseada.
- ▶ SICAT Suite cambia a la aplicación seleccionada.


17 ABRIR LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Las instrucciones de utilización de las aplicaciones SICAT están integradas en la ventana **Servicio de asistencia** en forma de archivos PDF.



Puede abrir la ventana **Servicio de asistencia** haciendo clic en el icono **Servicio de asistencia** de la **Barra de exploración** o pulsando la tecla F1.

La ventana **Servicio de asistencia** tiene el siguiente aspecto:

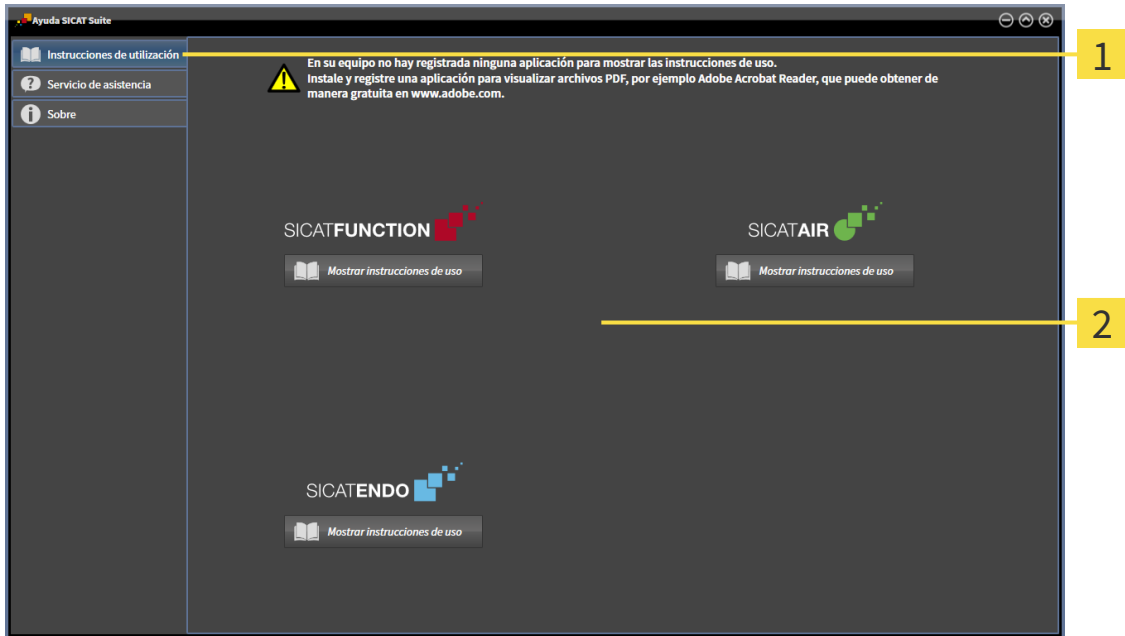

1 Pestaña **Instrucciones de utilización**

2 Ventana **Instrucciones de utilización**

Puede abrir la ayuda deseada haciendo clic en el botón **Mostrar instrucciones de utilización**.

18 LICENCIAS

SICAT Suite muestra únicamente las aplicaciones de SICAT para las que ha activado una licencia.



Si en SICAT Suite están disponibles las funciones **Añadir datos nuevos** o **Ver datos nuevos** gracias a licencias activadas, también puede ver los juegos de datos exportados con anterioridad sin la licencia de SICAT Endo activada.

Existen las siguientes clases de licencias:

- Una licencia del Viewer, con la que se puede utilizar una aplicación durante un tiempo ilimitado en el modo Viewer.
- Una licencia de demostración, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo limitado.
- Una licencia completa, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo ilimitado.

Para activar una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en PC en los que esté instalado SICAT Suite.

Para activar y desactivar licencias, se aplica lo siguiente:

- Se reciben únicamente claves de licencias de aplicaciones de SICAT autorizadas en su país.
- Si activa una clave de activación en un PC, se conectará al PC una licencia de las aplicaciones de SICAT o funciones contenidas. Las licencias no están disponibles para la activación en otro PC.
- Puede desactivar las licencias de forma independiente para cada aplicación de SICAT o función determinada. Las licencias devueltas están disponibles para una nueva activación en el mismo PC o en otros.
- Si devuelve la licencia completa de una aplicación SICAT, recibirá automáticamente una licencia del Viewer, siempre y cuando la aplicación esté autorizada en su país.
- Si activa una licencia completa, recibirá automáticamente licencias del Viewer para todas las aplicaciones autorizadas en su país.

Podrá saber cómo convertir un código canjeable en una clave de activación en *Canjear códigos* [► *Página 51 - Standalone*].

La ventana **Vista general de sus licencias** muestra una vista general de las licencias que están activadas en su PC. En las licencias de demostración, SICAT Suite muestra la fecha de caducidad de las licencias. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 45 - Standalone*].

Puede activar licencias de dos maneras:

- Si el PC en el que funciona SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, la activación de licencia puede realizarse automáticamente. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [► *Página 46 - Standalone*].
- Si se desea o si el PC en el que funciona SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet, puede realizar manualmente la activación de licencia utilizando archivos de solicitud de licencia. Debe cargar dichos archivos de solicitud de licencia a la página web de SICAT. A cambio, recibirá un archivo de activación de licencias que deberá activar en SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [► *Página 48 - Standalone*].

Puede desactivar individualmente licencias para cada aplicación o función. Tras desactivar una licencia, puede introducir la misma clave de activación u otra. Las licencias devueltas están disponibles para la activación en el mismo PC o en otros. Encontrará información sobre ello en *Devolver licencias al pool de licencias* [► *Página 50 - Standalone*].


18.1 ABRIR LA VENTANA "VISTA GENERAL DE SUS LICENCIAS"



1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Licencias**.
▶ Se abre la ventana **Vista general de sus licencias**:

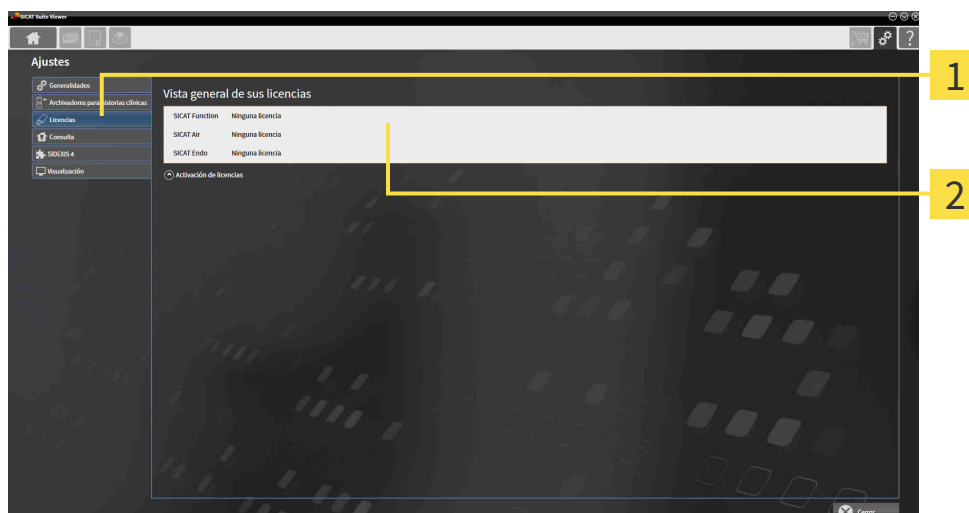

1 Pestaña **Licencias**

2 Ventana **Vista general de sus licencias**

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 46 - Standalone*]
- *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 48 - Standalone*]
- *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 50 - Standalone*]

18.2 ACTIVAR LICENCIAS MEDIANTE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA **La historia clínica debe estar cerrada.**
Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.


NOTA **La cesta de la compra debe estar vacía**
La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para iniciar el proceso de activación, haga lo siguiente:

- ☑ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia activada.
- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 45 - Standalone*].

1. Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en el botón **Activación de licencias**.

► Se abre el área **Vista general de sus licencias**:

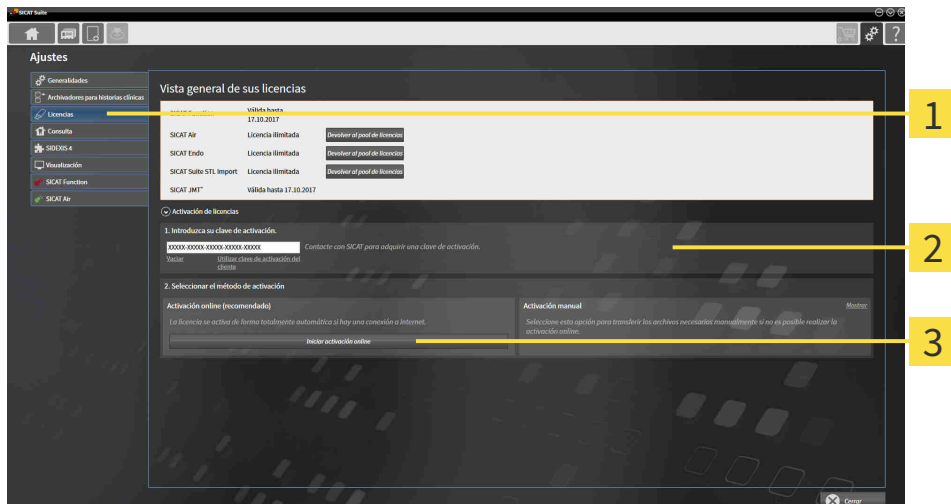

1 Botón **Activación de licencias**

2 Área **Introduzca su clave de activación**

3 Botón **Iniciar activación online**

2. Introduzca su clave de activación en el campo **Introduzca su clave de activación**.

3. Haga clic en el botón **Iniciar activación online**.

4. Si se abre una ventana **Cortafuegos de Windows**, permita a SICAT Suite acceder a Internet.
 - ▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias y se activan en SICAT Suite en el PC actual.
 - ▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente.**



Para volver a activar una aplicación de SICAT, puede usar su clave de activación haciendo clic en el botón **Utilizar clave de activación del cliente** en el área **Introduzca su clave de activación**. Para vaciar el campo con la clave de licencia actual, puede hacer clic en el botón **Vaciar**.

18.3 ACTIVAR LICENCIAS MANUALMENTE O SIN CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET


NOTA **La historia clínica debe estar cerrada.**
 Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

NOTA **La cesta de la compra debe estar vacía**
 La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para activar licencias manualmente o sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:

- ☑ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia activada.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias" [▶ Página 45 - Standalone].*

1. En la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en **Activación de licencias**.
 ▶ Se abre el área **Activación de licencias**.
2. En el área **Activación manual**, haga clic en **Mostrar**.
 ▶ Se abre el área **Activación manual**:

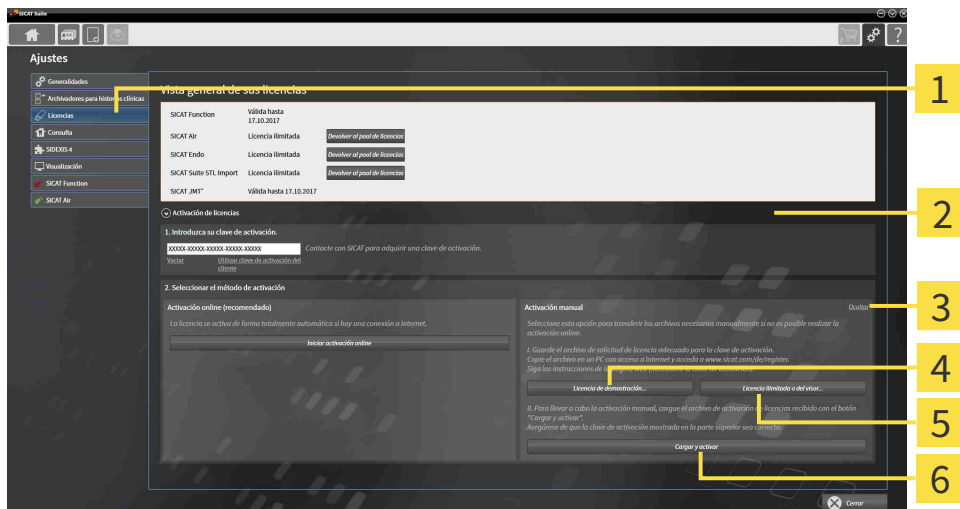

- | | |
|--|---|
| 1 Activación de licencias | 4 Botón Licencia de demostración |
| 2 Área Introduzca su clave de activación | 5 Botón Licencia completa o del visor |
| 3 Mostrar | 6 Botón Cargar y activar |

3. Si desea activar una licencia completa, haga clic en el botón **Licencia completa o del visor**.
4. Si desea activar una licencia de demostración, haga clic en el botón **Licencia de demostración**.
 ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
5. Seleccione la carpeta deseada para el archivo de solicitud de licencia y haga clic en **OK**.

- ▶ Se genera un archivo de solicitud de licencia con la extensión de archivo **WibuCmRaC** y se guarda en la carpeta seleccionada.
6. Copie el archivo de solicitud de licencia en un PC con una conexión activa a Internet, por ejemplo, con la ayuda de una memoria extraíble USB.
 7. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
 8. Siga las instrucciones de la página web de activación.
 - ▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias.
 - ▶ El servidor de licencias de SICAT genera un archivo de activación de licencias con la extensión de archivo **WibuCmRaU** que debe descargar a su PC.
 9. Copie de nuevo el archivo de activación de licencias descargado en el PC en el que se ejecuta SICAT Suite.
 10. Compruebe si está la clave correcta en el campo **Introduzca su clave de activación**.
 11. Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, haga clic en el botón **Cargar y activar**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
 12. Navegue hasta el archivo de activación de licencias, selecciónelo y haga clic en **OK**.
 - ▶ La licencia del archivo de activación de licencias se instala en SICAT Suite en el PC actual.
 - ▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente**.

18.4 DEVOLVER LICENCIAS AL POOL DE LICENCIAS

NOTA

La historia clínica debe estar cerrada.

Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.


NOTA

La cesta de la compra debe estar vacía

La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para desactivar una licencia completa y devolverla al pool de licencias, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha activado la licencia completa de una aplicación SICAT.
- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ☑ La ventana **Vista general de sus licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de sus licencias"* [► *Página 45 - Standalone*].

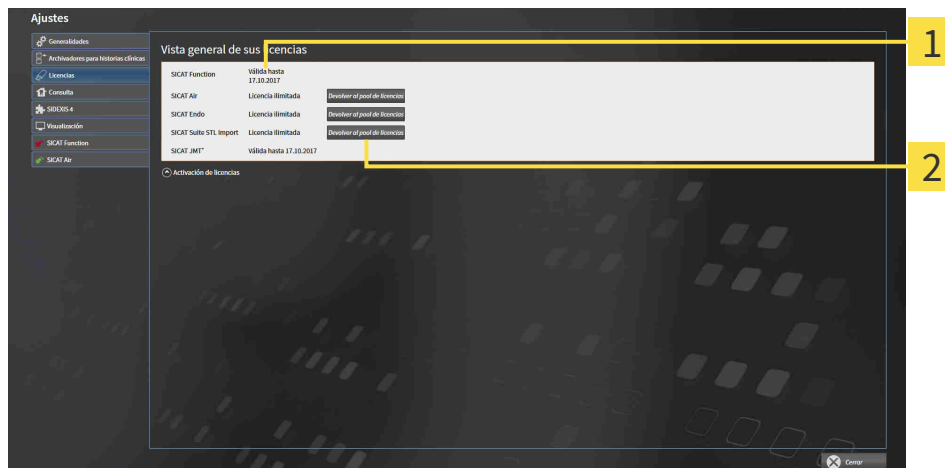

1 Estado de licencia de las aplicaciones SICAT y de funciones concretas

2 Botón **Devolver al pool de licencias**

- Dentro de la ventana **Vista general de sus licencias**, en la fila de la aplicación SICAT deseada o de una función concreta, haga clic en el botón **Devolver al pool de licencias**.
- ▶ La licencia seleccionada se devuelve al pool de licencias y vuelve a estar disponible para la activación.
- ▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha devuelto correctamente al pool de licencias**.
- ▶ Sin una licencia, una aplicación solo está disponible en el modo Viewer. Si se han devuelto las licencias de todas las aplicaciones SICAT al pool de licencias, SICAT Suite cambia completamente al modo Viewer.



Si desea desactivar una licencia en un PC sin tener conexión activa a Internet, póngase en contacto con la asistencia SICAT.

18.5 CANJEAR CÓDIGOS

1. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
2. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - ▶ Se abrirá el portal SICAT.
3. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
4. En la administración de cuentas, haga clic en la entrada para administrar sus licencias.
5. Introduzca su código canjeable y confírmelo.
 - ▶ El portal SICAT genera una clave de licencia y añade la clave de licencia a su clave de activación.
6. Inicie SICAT Suite y active la licencia.

Encontrará información al respecto en *Activar licencias mediante una conexión activa a Internet* [▶ *Página 46 - Standalone*] y *Activar licencias manualmente o sin conexión activa a Internet* [▶ *Página 48 - Standalone*].



Encontrará más ayuda en la sección de preguntas más frecuentes (FAQ) del portal SICAT.

19 ARCHIVADORES DE HISTORIAS CLÍNICAS

COPIA DE SEGURIDAD



La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.

Usted mismo es el responsable de proteger los datos de pacientes contenidos en los archivadores de historias clínicas. En **Archivadores para historias clínicas** puede consultar dónde están guardados los archivadores de historias clínicas. Si ha eliminado los archivadores de historias clínicas de la lista **Sus archivadores de historias clínicas**, SICAT Suite deja de mostrarlos aunque todavía se encuentren en sus respectivos soportes de datos.



Además de los datos de paciente, también deben guardarse los parámetros de usuario de las aplicaciones SICAT. Los parámetros definidos por cada usuario se encuentran en dos directorios independientes. Para abrir estos directorios, introduzca `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` y `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` en la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows.

SEGURIDAD DE DATOS



Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.



El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.



Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.

INFORMACIONES GENERALES



La administración de archivadores de historias clínicas solo está disponible si hay una licencia de aplicación activada en SICAT Suite.



Una nueva versión de la versión independiente de SICAT Suite necesita archivadores de historias clínicas actualizados. Al iniciar por primera vez la nueva versión o activar un archivador de historias clínicas obsoleto, SICAT Suite pregunta al usuario si desea actualizar el archivador. Si se confirma el mensaje, SICAT Suite actualiza automáticamente el archivador de historias clínicas. **¡PRECAUCIÓN! Los archivadores de historias clínicas actualizados ya no pueden utilizarse con versiones antiguas de SICAT Suite.**

SICAT Suite administra los datos del paciente de la siguiente manera:

- Todas las radiografías 3D de un paciente y todos los proyectos de planificación correspondientes están organizados en historias clínicas.
- Las historias clínicas se guardan en archivadores de historias clínicas.
- Los archivadores de historias clínicas se guardan en carpetas en un sistema de archivos local o en un sistema de archivos en red.

SICAT Suite necesita al menos un archivador de historias clínicas para funcionar como versión completa. Pueden administrarse varios archivadores de historias clínicas. No obstante, solo puede haber un archivador de historias clínicas activo al mismo tiempo. Tanto en un sistema de archivos local como en un sistema de archivos en red, solo puede acceder a los archivadores de historias clínicas un SICAT Suite al mismo tiempo. Únicamente puede editar y guardar historias clínicas del archivador de historias clínicas activo.



Los archivadores de historias clínicas en sistemas de archivos en red necesitan una conexión de red con un determinado ancho de banda mínimo. Encontrará más información al respecto en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 8 - Standalone*].

Para administrar los archivadores de historias clínicas están disponibles las siguientes acciones:

- *Abrir la ventana "Archivadores de historias clínicas"* [▶ *Página 54 - Standalone*]
- *Añadir archivadores de historias clínicas* [▶ *Página 55 - Standalone*]
- *Activar otro archivador de historias clínicas* [▶ *Página 57 - Standalone*]
- *Eliminar archivadores de historias clínicas* [▶ *Página 59 - Standalone*].

19.1 ABRIR LA VENTANA "ARCHIVADORES DE HISTORIAS CLÍNICAS"

Para abrir la ventana **Archivadores para historias clínicas**, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el icono **Ajustes** de la **Barra de exploración**.

► La ventana **Ajustes** se abre.



2. Haga clic en la pestaña **Archivadores para historias clínicas**.

► La ventana **Archivadores para historias clínicas** se abre:

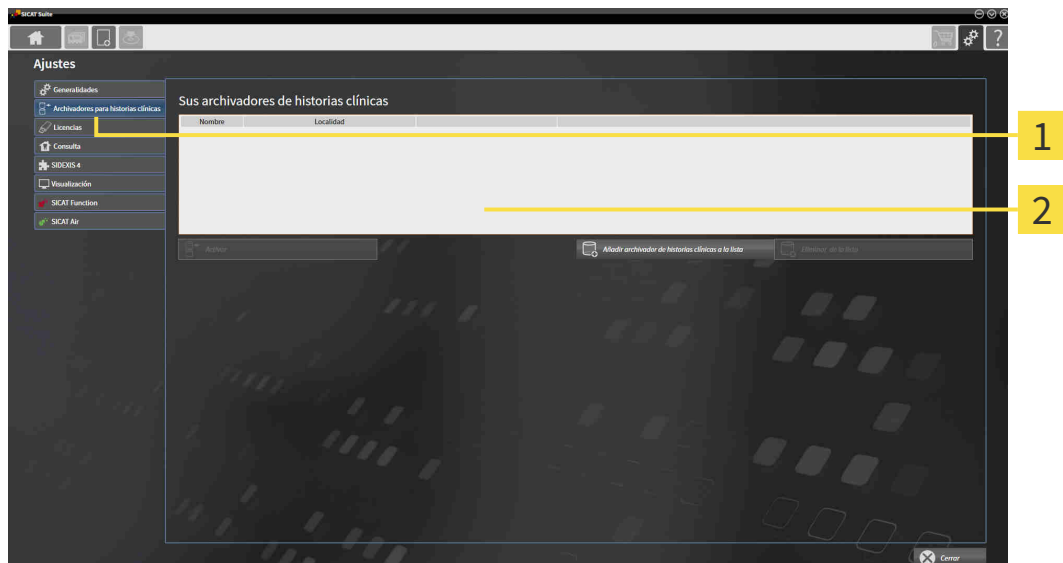

1 Pestaña **Archivadores para historias clínicas**

2 Ventana **Archivadores para historias clínicas**

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Añadir archivadores de historias clínicas* [► *Página 55 - Standalone*]
- *Activar otro archivador de historias clínicas* [► *Página 57 - Standalone*]
- *Eliminar archivadores de historias clínicas* [► *Página 59 - Standalone*].

19.2 AÑADIR ARCHIVADORES DE HISTORIAS CLÍNICAS

PRECAUCIÓN

La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.




SICAT Suite guarda archivadores de historias clínicas en sistemas de archivos. Solo puede guardar un archivador de historias clínicas por carpeta. Por ello, una carpeta en la que desee guardar un nuevo archivador de historias clínicas debe estar vacía.



SICAT Suite añade un archivador de historias clínicas existente si se aplican las siguientes condiciones: la carpeta seleccionada ya contiene un archivador de historias clínicas, pero no está incluida en la lista de archivadores de historias clínicas.

Para crear un archivador de historias clínicas nuevo o añadir un archivador de historias clínicas existente, haga lo siguiente:

- La ventana **Archivadores para historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Archivadores de historias clínicas"* [[▶ Página 54 - Standalone](#)].

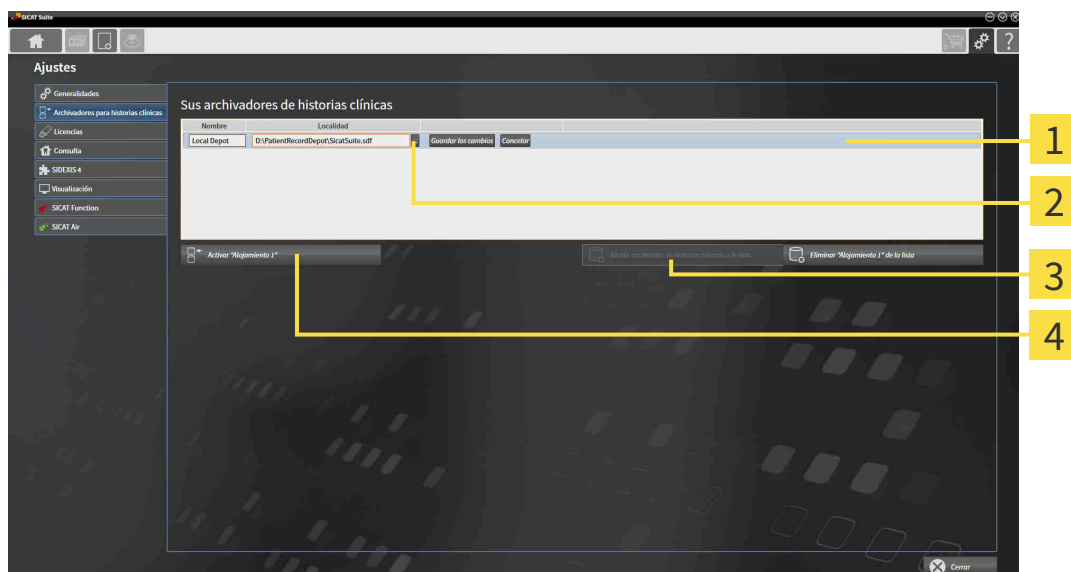

1 Línea del nuevo archivador de historias clínicas

2 Botón **Examinar**

3 Botón **Añadir archivador de historias clínicas a la lista**

4 Botón para activar el archivador de historias clínicas seleccionado



1. Dentro de la ventana **Archivadores para historias clínicas**, haga clic en el botón **Añadir archivador de historias clínicas a la lista**.
 - ▶ SICAT Suite añade a la lista **Sus archivadores de historias clínicas** una nueva línea para el nuevo archivador de historias clínicas.
2. En la línea del nuevo archivador de historias clínicas, haga clic en el botón **Examinar**.
 - ▶ La ventana **Examinar** se abre.

3. Seleccione la carpeta deseada en la ventana **Examinar** y haga clic en **OK**.
 - ▶ La ventana **Examinar** se cierra y SICAT Suite añade la ruta de la carpeta deseada a la línea del nuevo archivador de historias clínicas.
4. En la línea del nuevo archivador de historias clínicas, haga clic en el campo **Nombre** e introduzca un nombre reconocible para el nuevo archivador de historias clínicas.
5. Haga clic en **Guardar los cambios** mientras el nuevo archivador de historias clínicas está aún seleccionado.
 - ▶ Si en ese momento hay una historia clínica activa, se abre un mensaje de confirmación.
6. En el mensaje de confirmación, haga clic en el botón **Cambiar de archivador de historias clínicas (se cerrará la historia clínica)**.
 - ▶ SICAT Suite activa el nuevo archivador de historias clínicas. El estilo de fuente de la línea correspondiente cambia a negrita.
 - ▶ SICAT Suite desactiva el archivador de historias clínicas, que antes estaba activo. El estilo de fuente de la línea correspondiente cambia a normal.



Puede hacer clic en **Cancelar** para cancelar la adición de un archivador de historias clínicas.



Puede reconocer un archivador de historias clínicas creado en un archivo SDF situado en la correspondiente carpeta.

19.3 ACTIVAR OTRO ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS




Cambiar el archivador de historias clínicas puede ser útil por ejemplo en los siguientes casos:

- Desea cambiar entre un archivador de historias clínicas en un sistema de archivos en red de su consulta y un archivador de historias clínicas en su portátil.
- Desea mostrar públicamente datos del paciente que están anonimizados en otro archivador de historias clínicas, por ejemplo, con fines de formación.

Para activar otro archivador de historias clínicas, haga lo siguiente:

- ☑ No hay ninguna historia clínica activa. Si hay una historia clínica activa, SICAT Suite la cierra automáticamente.
- ☑ El archivador de historias clínicas que desea activar no está abierto en ningún SICAT Suite en otro PC.
- ☑ La ventana **Archivadores para historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Archivadores de historias clínicas"* [▶ *Página 54 - Standalone*].

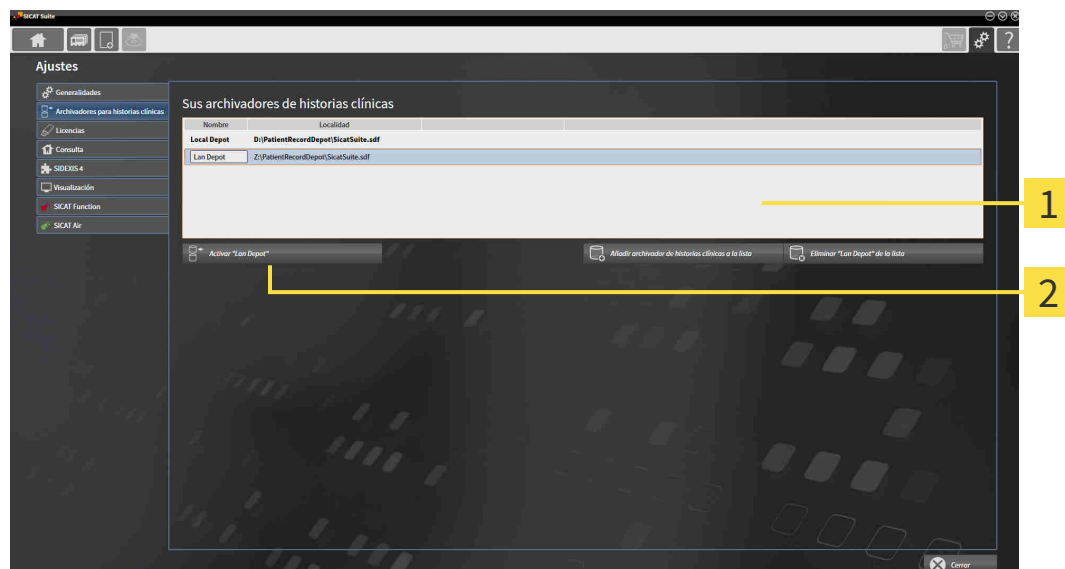

1 Lista **Sus archivadores de historias clínicas**

2 Botón para activar el archivador de historias clínicas seleccionado

1. Haga clic en el archivador de historias clínicas deseado en la lista **Sus archivadores de historias clínicas** de la ventana **Archivadores para historias clínicas**.
2. Haga clic en el botón para activar el archivador de historias clínicas seleccionado.
 - ▶ Si en ese momento hay una historia clínica activa, se abre un mensaje de confirmación.
3. En el mensaje de confirmación, haga clic en el botón **Cambiar de archivador de historias clínicas (se cerrará la historia clínica)**.
 - ▶ SICAT Suite activa el archivador de historias clínicas seleccionado.





Una nueva versión de la versión independiente de SICAT Suite necesita archivadores de historias clínicas actualizados. Al iniciar por primera vez la nueva versión o activar un archivador de historias clínicas obsoleto, SICAT Suite pregunta al usuario si desea actualizar el archivador. Si se confirma el mensaje, SICAT Suite actualiza automáticamente el archivador de historias clínicas. **¡PRECAUCIÓN! Los archivadores de historias clínicas actualizados ya no pueden utilizarse con versiones antiguas de SICAT Suite.**


19.4 ELIMINAR ARCHIVADORES DE HISTORIAS CLÍNICAS



SICAT Suite solo elimina un archivador de historias clínicas de la lista **Sus archivadores de historias clínicas**. No elimina los archivadores de historias clínicas del sistema de archivos. Puede volver a añadir un archivador de historias clínicas existente que haya sido eliminado de la lista **Sus archivadores de historias clínicas**. Encontrará más información al respecto en *Añadir archivadores de historias clínicas* [► *Página 55 - Standalone*].

Para eliminar un archivador de historias clínicas de la lista **Sus archivadores de historias clínicas**, haga lo siguiente:

- No hay ninguna historia clínica abierta.
- La ventana **Archivadores para historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Archivadores de historias clínicas"* [► *Página 54 - Standalone*].

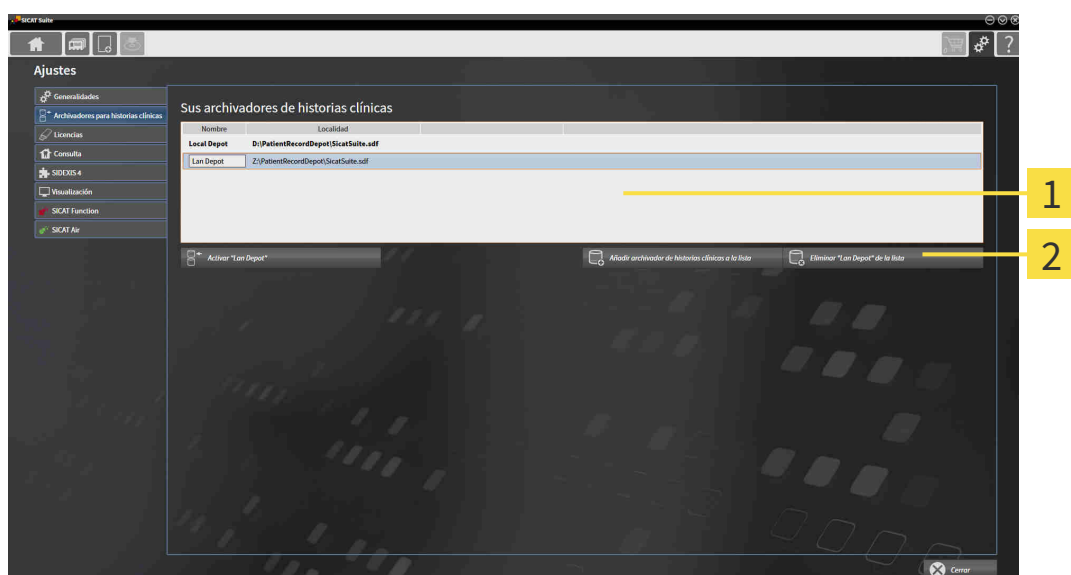

1 Lista **Sus archivadores de historias clínicas**

2 Botón para eliminar el archivador de historias clínicas seleccionado


1. Haga clic en el archivador de historias clínicas deseado en la lista **Sus archivadores de historias clínicas** de la ventana **Archivadores para historias clínicas**.



2. Haga clic en el botón para eliminar el archivador de historias clínicas seleccionado.

► SICAT Suite elimina el archivador de historias clínicas seleccionado de la lista **Sus archivadores de historias clínicas**.


20 IMPORTACIÓN DE DATOS



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.


Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

La eliminación de datos originales podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

No elimine los datos originales tras la importación.



La importación de datos solo está disponible si hay una licencia activada y también un archivador de historias clínicas creado y activado. Sin una licencia o un archivador de historias clínicas solo puede abrir datos en el modo Viewer. Encontrará más información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 238 - Standalone*].

SICAT Suite puede importar radiografías 3D de los siguientes formatos de datos:

- Datos DICOM de SICAT Suite
- Radiografías 3D (DICOM, encontrará más información al respecto en *Formato DICOM compatible* [▶ *Página 62 - Standalone*])
- Datos SICAT Implant
- Datos de pedido de las plantillas de perforación SICAT
- Datos de GALILEOS Wrap&Go.

Dos ajustes determinan la forma en que SICAT Suite importa radiografías 3D al archivador de historias clínicas activo:

- Los ajustes de importación determinan si SICAT Suite importa una radiografía 3D, no la importa, sobrescribe una radiografía 3D existente o crea un duplicado.
- Los ajustes de asignación determinan las historias clínicas a las que SICAT Suite asigna una radiografía 3D importada.

Si en un juego de datos hay estudios de aplicaciones SICAT, SICAT Suite importa los estudios junto con las radiografías 3D.

AJUSTES DE IMPORTACIÓN PARA RADIOGRAFÍAS 3D

Si el archivador de historias clínicas activo incluye historias clínicas, puede seleccionar diferentes ajustes de importación para radiografías 3D. Los ajustes de importación disponibles dependen de si la ID de los datos que desea importar corresponde o no a la ID de una historia clínica en el archivador de historias clínicas activo.

Puede seleccionar una opción de importación individualmente para cada radiografía 3D:

TIPO DE DATOS	LA ID COINCIDE	LA ID NO COINCIDE	SIEMPRE DISPONIBLE
Datos DICOM de SICAT Suite Datos SICAT Implant Datos de pedido de las plantillas de perforación SICAT	Sobrescribir existente: SICAT Suite importa la radiografía 3D y sobrescribe el juego de datos existente con la misma ID.	Añadir: SICAT Suite importa la radiografía 3D como nuevo juego de datos.	No añadir: SICAT Suite no importa la radiografía 3D.
Datos DICOM de otros proveedores Datos de Galileos Wrap&Go	Añadir adicionalmente: SICAT Suite importa la radiografía 3D como copia de un juego de datos existente.	Añadir: SICAT Suite importa la radiografía 3D como nuevo juego de datos.	No añadir: SICAT Suite no importa la radiografía 3D.

COMPARACIÓN DE ATRIBUTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

SICAT Suite analiza diferentes atributos de los datos que desea importar. Estos atributos son:

- Apellidos
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- ID del paciente, por ejemplo, el número de la seguridad social o una ID del paciente interna de su consulta

AJUSTES PARA LA ASIGNACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

La siguiente lista muestra la opción de importación que propone SICAT Suite en función de la comparación de atributos:

- Todos los atributos de los datos que desea importar corresponden a los atributos de una historia clínica en el archivador de historias clínicas: SICAT Suite propone la opción **Añadir a una historia clínica existente** y la historia clínica adecuada.
- No todos los atributos de los datos que desea importar corresponden a los atributos de una historia clínica en el archivador de historias clínicas: SICAT Suite propone la opción **Crear historia clínica nueva**.

En ambos casos puede asignar manualmente los datos a otra historia clínica.

Para importar datos, realice las siguientes acciones en el orden indicado:

- *Seleccionar los datos que desea importar* [▶ [Página 63 - Standalone](#)]
- *Seleccionar una opción de importación* [▶ [Página 65 - Standalone](#)]
- *Asignar datos a una historia clínica existente* [▶ [Página 67 - Standalone](#)].

O bien

- *Crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos* [▶ [Página 66 - Standalone](#)].

20.1 FORMATO DICOM COMPATIBLE

Al efectuar la importación de juegos de datos DICOM, SICAT Suite es compatible con juegos de datos que cumplen los siguientes criterios:

- El juego de datos existe en formato DICOM 3.0.
- El juego de datos solo contiene cortes paralelos.
- El juego de datos está sin comprimir, comprimido mediante JPEG o mediante JPEG 2000.
- El juego de datos corresponde a uno de los tipos compatibles de la siguiente lista.

Los tipos de juegos de datos compatibles son:

- CT Image
- Digital X-Ray Image
- Digital Intraoral X-Ray Image
- X-Ray 3D Craniofacial Image
- Secondary Capture Image (grayscale) (solo para la modalidad TC)
- Multiframe Grayscale Word Secondary Capture Image (solo para la modalidad TC)

En el DICOM Conformance Statement figuran más criterios que SICAT pondrá a su disposición si lo solicita. Los datos de contacto necesarios se encuentran al dorso.

20.2 SELECCIONAR LOS DATOS QUE DESEA IMPORTAR

PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.

PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.


Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.

Para importar datos al archivador de historias clínicas activo, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el icono **Datos nuevos** de la **Barra de exploración**.

► La ventana **Datos nuevos** se abre:

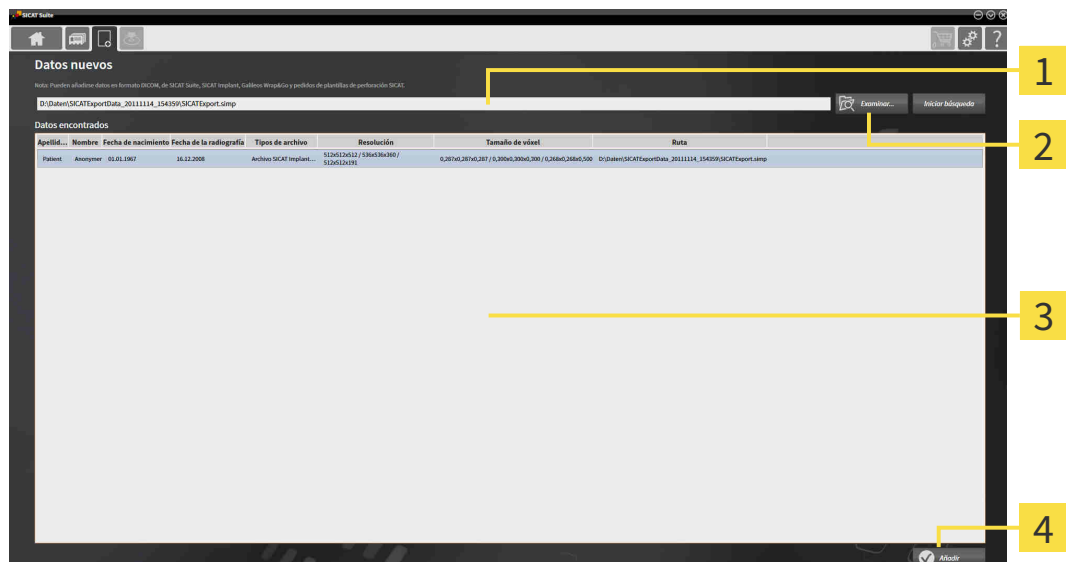

1 Campo **¿Dónde se encuentran los datos**

3 Lista **Datos encontrados**

2 Botón **Examinar**

4 Botón **Añadir**



2. Haga clic en el botón **Examinar**.

► La ventana **Seleccionar archivo o directorio** se abre.

3. Seleccione el archivo deseado o la carpeta deseada en la ventana **Seleccionar archivo o directorio** y haga clic en **OK**.
 - ▶ SICAT Suite cierra la ventana **Seleccionar archivo o directorio** y transfiere la ruta del archivo o carpeta seleccionados al campo **¿Dónde se encuentran los datos**.
 - ▶ Si ha seleccionado un archivo compatible, SICAT Suite muestra los contenidos del archivo en la lista **Datos encontrados**.
 - ▶ Si ha seleccionado una carpeta, SICAT Suite examina la carpeta y todas las subcarpetas. En la lista **Datos encontrados**, SICAT Suite muestra los archivos compatibles contenidos en una de las carpetas examinadas.



También puede utilizar la opción de arrastrar y soltar para importar datos a SICAT Suite.



Si sigue el procedimiento descrito, la búsqueda se iniciará automáticamente. Puede cancelar la búsqueda haciendo clic en el botón **Detener búsqueda**. Si introduce manualmente una ruta de un archivo o una carpeta en el campo **¿Dónde se encuentran los datos**, debe hacer clic en el botón **Iniciar búsqueda**. Esto también puede ser útil para reiniciar una búsqueda si el contenido de la carpeta ha cambiado o usted ha finalizado la búsqueda accidentalmente.



Si SICAT Suite no encuentra determinados archivos pese a ser compatibles, podría deberse a que las rutas de los archivos son excesivamente largas. Copie los archivos en un nivel más elevado del sistema de archivos y reinicie la búsqueda.


Continúe con *Seleccionar una opción de importación* [▶ *Página 65 - Standalone*].

20.3 SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE IMPORTACIÓN

Para seleccionar una opción de importación para cada estudio, haga lo siguiente:



1. Seleccione el estudio deseado de la lista **Datos encontrados** y haga clic en el botón **Añadir**.
▶ Se abre la ventana **Añadir**:

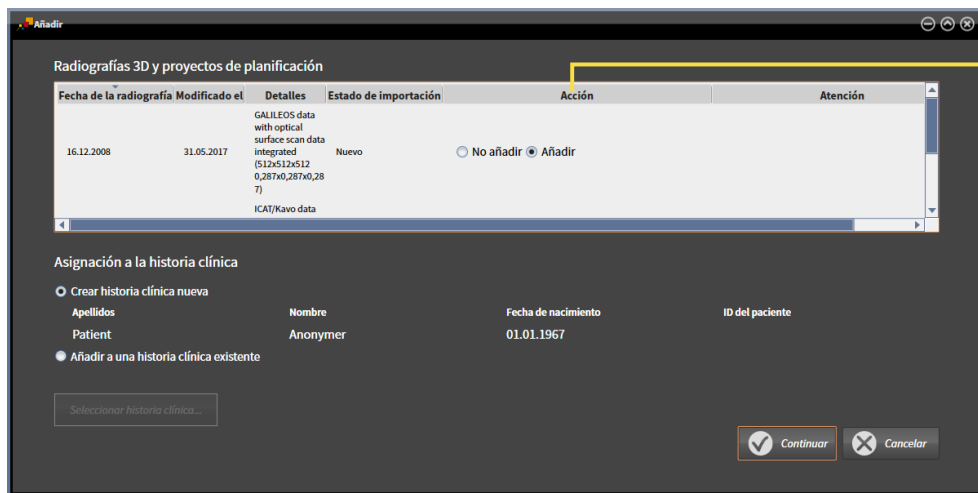

1 Columna **Acción**

2. En la ventana **Añadir**, vaya a la columna **Acción** y seleccione una de las siguientes entradas para cada estudio: **No añadir**, **Añadir adicionalmente**, **Añadir** o **Sobrescribir existente**. Encontrará una descripción detallada de las opciones en *Importación de datos* [▶ *Página 60 - Standalone*].

▶ En cada uno de los estudios está determinado si desea importarlos o no.


Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Asignar datos a una historia clínica existente* [▶ *Página 67 - Standalone*]
- *Crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos* [▶ *Página 66 - Standalone*]

20.4 CREAR UNA NUEVA HISTORIA CLÍNICA MEDIANTE LA IMPORTACIÓN DE DATOS



Puede crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos si aún no hay ninguna historia clínica con la misma combinación de atributos en el archivador de historias clínicas activo.

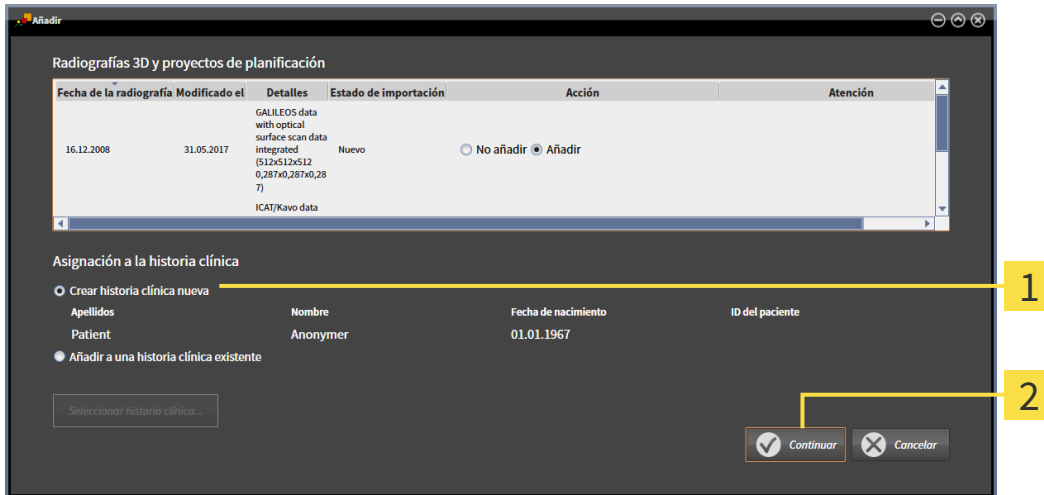

1 Opción **Crear historia clínica nueva**

2 Botón **Continuar**

Para asignar a una nueva historia clínica datos que desea importar, haga lo siguiente:

- En el área **Asignación a la historia clínica**, seleccione la opción **Crear historia clínica nueva** y haga clic en el botón **Continuar**.
- ▶ SICAT Suite crea una nueva historia clínica con los atributos de los datos seleccionados.
- ▶ SICAT Suite importa los datos seleccionados y los asigna a la nueva historia clínica.
- ▶ La ventana **Vista general de historias clínicas** se abre y SICAT Suite destaca la historia clínica importada en la lista **Historias clínicas**. Encontrará más información al respecto en *Historias clínicas* [▶ *Página 70 - Standalone*].

20.5 ASIGNAR DATOS A UNA HISTORIA CLÍNICA EXISTENTE


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.



SICAT Suite escoge la opción **Añadir a una historia clínica existente** automáticamente con la historia clínica correspondiente si se cumple la siguiente condición: todos los atributos de los datos que desea importar corresponden a los atributos de una historia clínica en el archivador de historias clínicas activo.

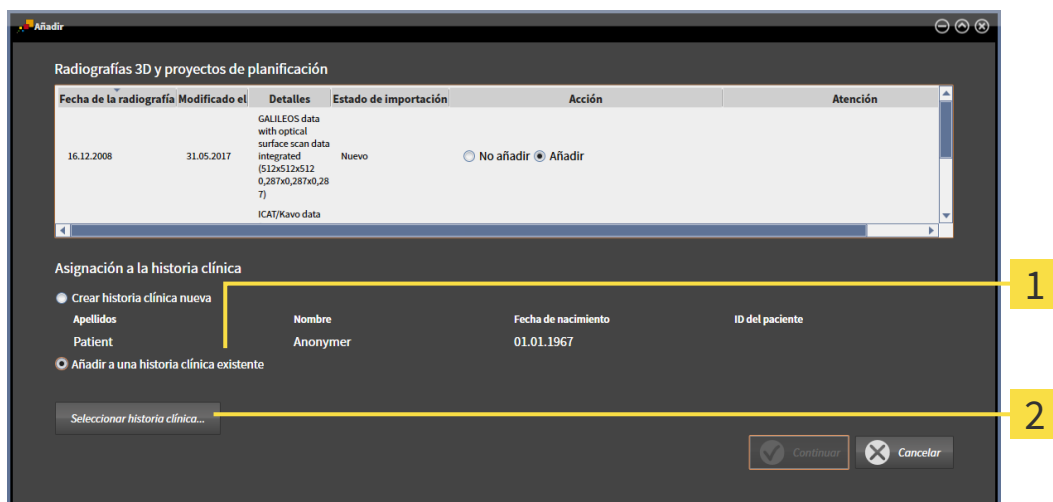

1 Opción **Añadir a una historia clínica existente**


2 Botón **Seleccionar historia clínica**

Para asignar manualmente a una historia clínica existente datos que desea importar, haga lo siguiente:

El archivador de historias clínicas activo contiene al menos una historia clínica.

1. En el área **Asignación a la historia clínica**, seleccione la opción **Añadir a una historia clínica existente** y haga clic en el botón **Seleccionar historia clínica**.


- ▶ La ventana **Seleccionar historia clínica** se abre y muestra una lista de las historias clínicas ya existentes.

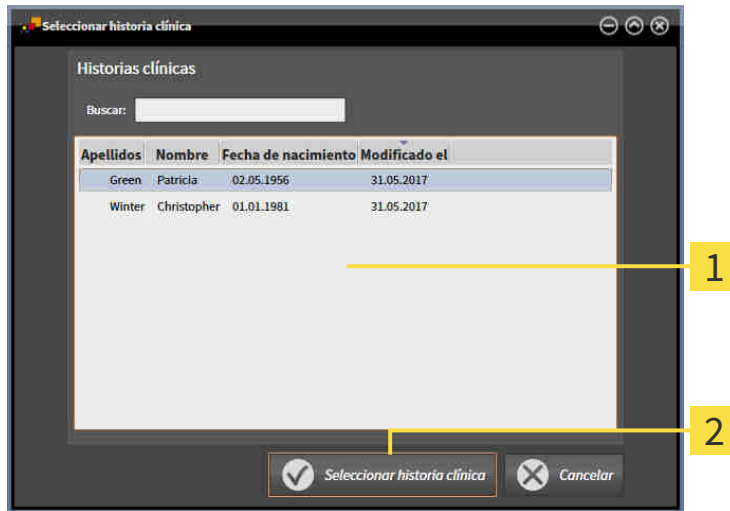

- 1** Lista **Historias clínicas**
- 2** Botón **Seleccionar historia clínica**

2. Haga clic en la historia clínica que desee y luego en el botón **Seleccionar historia clínica**.


- ▶ La ventana **Seleccionar historia clínica** se cierra.
- ▶ La ventana **Añadir** muestra los atributos de la historia clínica seleccionada.

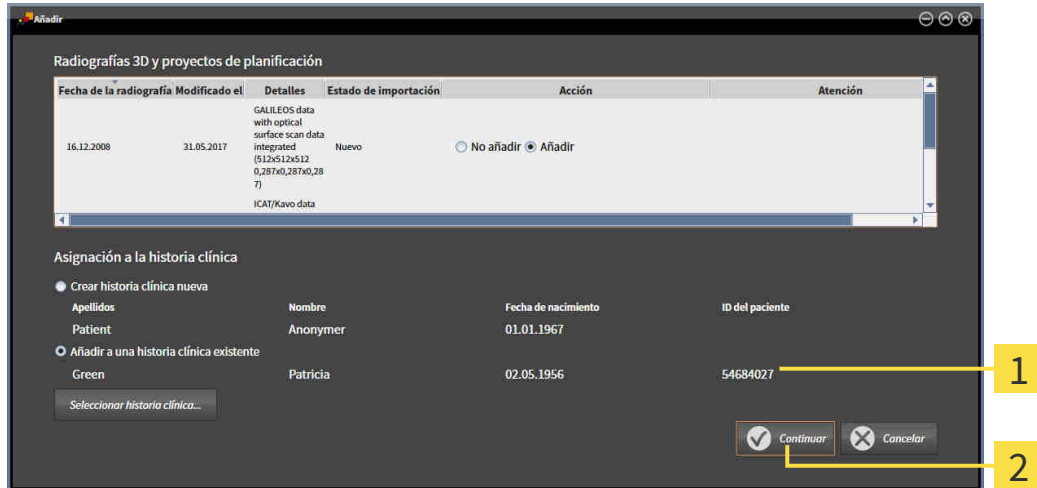

- 1** Atributos de la historia clínica seleccionada
- 2** Botón **Continuar**

3. Dentro de la ventana **Añadir**, haga clic en el botón **Continuar**.

- Si los atributos de los datos que desea importar no corresponden a los atributos de la historia clínica seleccionada, aparece un mensaje de aviso:

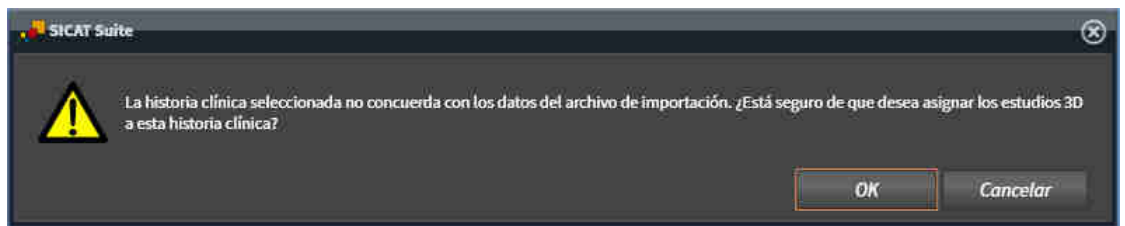

- Si aun así desea importar los datos, haga clic en **OK**.
 - ▶ SICAT Suite importa los datos seleccionados y los asigna a una historia clínica existente.
 - ▶ La ventana **Vista general de historias clínicas** se abre y SICAT Suite destaca la historia clínica importada en la lista **Historias clínicas**. Encontrará más información al respecto en *Historias clínicas* [▶ *Página 70 - Standalone*].

21 HISTORIAS CLÍNICAS

Las historias clínicas pueden contener varios estudios 3D. Un estudio consta de una radiografía 3D y los correspondientes proyectos de planificación. Además, las historias clínicas pueden contener documentos generados durante la planificación.

Para administrar las historias clínicas están disponibles las siguientes acciones:

- *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas" [▶ Página 71 - Standalone]*
- *Buscar y clasificar historias clínicas en el archivador de historias clínicas [▶ Página 72 - Standalone]*
- *Activar historias clínicas [▶ Página 74 - Standalone]*
- *Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas [▶ Página 78 - Standalone]*
- *Trabajar con historias clínicas activas [▶ Página 75 - Standalone]*
- *Modificar los atributos de las historias clínicas [▶ Página 77 - Standalone]*
- *Eliminar historias clínicas de los archivadores de historias clínicas [▶ Página 84 - Standalone]*
- *Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas [▶ Página 86 - Standalone]*

Además, dispone de acciones para la importación de datos a historias clínicas y la exportación de datos desde estas:


- *Importación de datos [▶ Página 60 - Standalone]*
- *Exportación de datos [▶ Página 208 - Standalone]*

21.1 ABRIR LA VENTANA "VISTA GENERAL DE HISTORIAS CLÍNICAS"

Para abrir la ventana **Vista general de historias clínicas**, haga lo siguiente:




- Haga clic en el icono **Historias clínicas** de la **Barra de exploración**.
- ▶ La ventana **Vista general de historias clínicas** se abre:

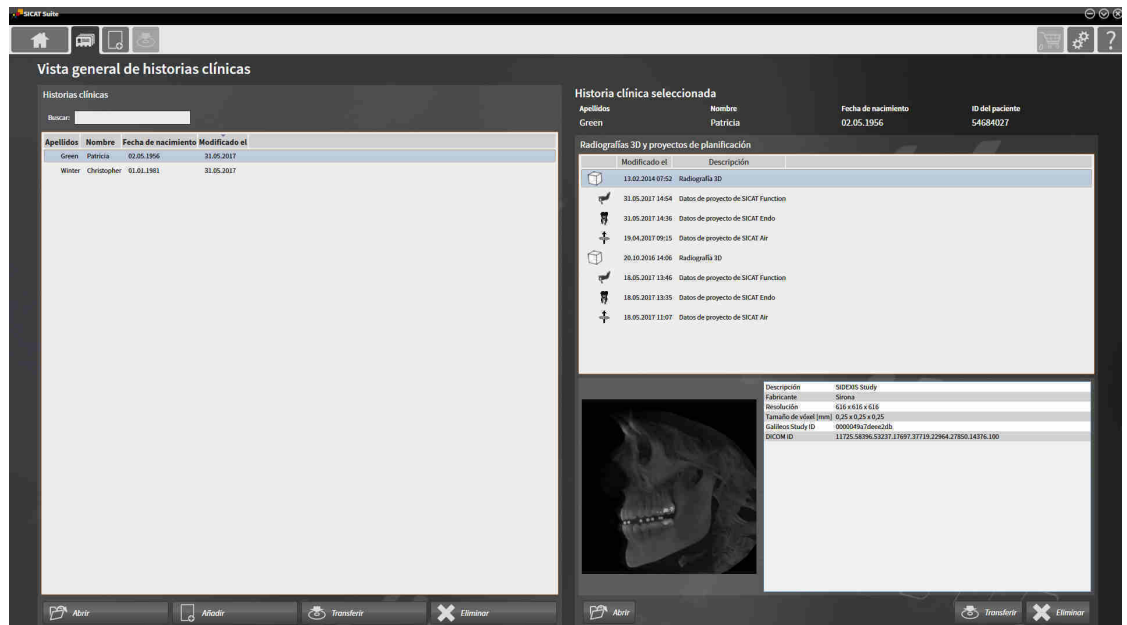

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Buscar y clasificar historias clínicas en el archivador de historias clínicas* [▶ *Página 72 - Standalone*]
- *Activar historias clínicas* [▶ *Página 74 - Standalone*]
- *Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas* [▶ *Página 78 - Standalone*]
- *Trabajar con historias clínicas activas* [▶ *Página 75 - Standalone*]
- *Modificar los atributos de las historias clínicas* [▶ *Página 77 - Standalone*]
- *Eliminar historias clínicas de los archivadores de historias clínicas* [▶ *Página 84 - Standalone*]
- *Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas* [▶ *Página 86 - Standalone*].

21.2 BUSCAR Y CLASIFICAR HISTORIAS CLÍNICAS EN EL ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS

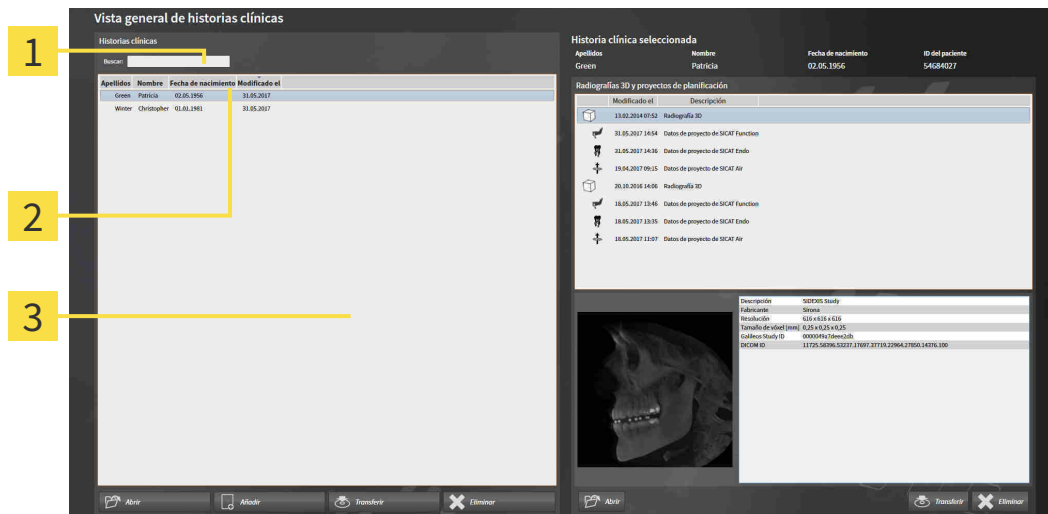

- 1 Campo **Buscar**
- 2 Título de las columnas con atributos
- 3 Lista **Historias clínicas**

BUSCAR HISTORIAS CLÍNICAS

SICAT Suite examina los atributos de todas las historias clínicas por el texto de búsqueda introducido.

Para buscar una historia clínica, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 71 - Standalone*].
 - Introduzca el texto de búsqueda deseado en el campo **Buscar**.
- ▶ La lista **Historias clínicas** muestra todas las historias clínicas que contienen el texto de búsqueda introducido en un atributo.

SICAT Suite inicia la búsqueda en cuanto usted empieza a introducir el texto.

CLASIFICAR HISTORIAS CLÍNICAS SEGÚN ATRIBUTOS

Puede clasificar historias clínicas según los siguientes atributos:

- **Apellidos**
- **Nombre**
- **Fecha de nacimiento**
- **Modificado el**

Para clasificar historias clínicas según atributos, haga lo siguiente:

- La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [[▶ Página 71 - Standalone](#)].



1. En la lista **Historias clínicas**, haga clic en el título de la columna del atributo deseado.
▶ SICAT Suite clasifica la lista **Historias clínicas** según el orden del atributo deseado.
2. En la lista **Historias clínicas**, haga clic de nuevo en el título de la columna del atributo deseado.
▶ SICAT Suite clasifica la lista **Historias clínicas** por orden inverso del atributo deseado.




De forma predeterminada las historias clínicas están clasificadas en orden descendente por la fecha de modificación.

21.3 ACTIVAR HISTORIAS CLÍNICAS

Para trabajar con una historia clínica, actívela de la siguiente manera:

- ☑ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [► *Página 71 - Standalone*].

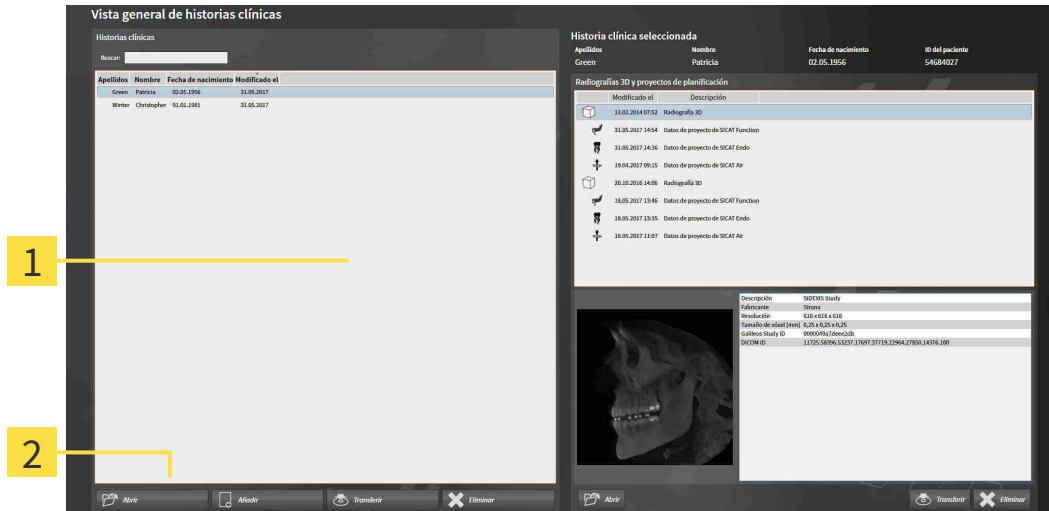

1 Lista **Historias clínicas**

2 Botón para activar la historia clínica seleccionada

1. Seleccione la historia clínica que desee de la lista **Historias clínicas**.
 2. Haga clic en el botón para activar la historia clínica seleccionada.
- SICAT Suite activa la historia clínica seleccionada.

Continúe con *Trabajar con historias clínicas activas* [► *Página 75 - Standalone*]

21.4 TRABAJAR CON HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVAS

PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.


PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Para trabajar con una historia clínica activa, haga lo siguiente:

- Ya hay una historia clínica activa. Encontrará información sobre ello en *Activar historias clínicas* [▶ *Página 74 - Standalone*].

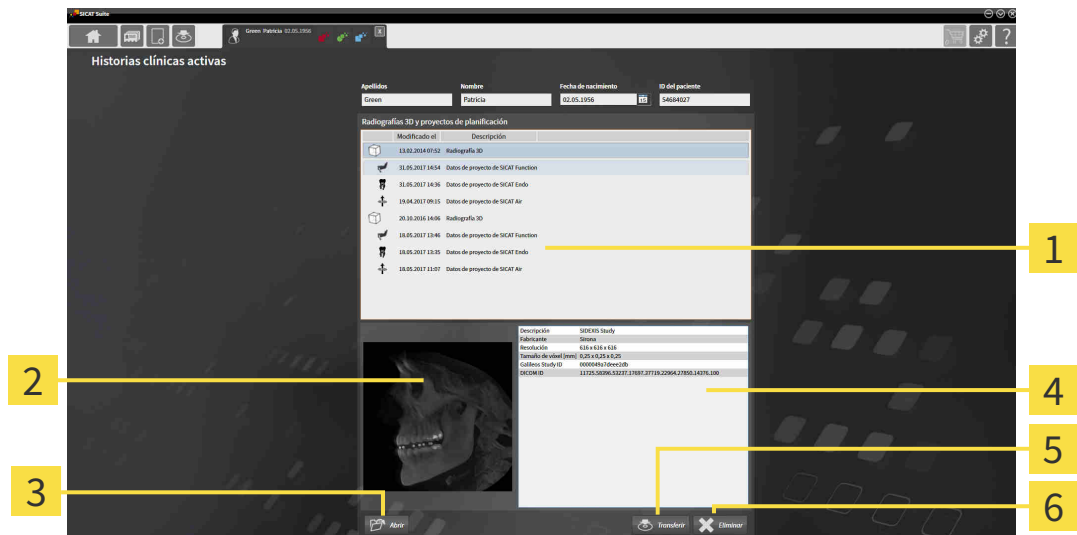

1 Lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**

4 Área **Detalles**

2 Área **Vista general**

5 Botón **Transferir**

3 Botón **Abrir**

6 Botón **Eliminar**

1. En la ventana **Historias clínicas activas**, seleccione la radiografía 3D deseada o el proyecto de planificación deseado de la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**.
 - ▶ El área **Vista general** muestra una vista previa de la radiografía 3D seleccionada o del proyecto de planificación seleccionado.
 - ▶ El área **Detalles** muestra detalles de la radiografía 3D seleccionada o del proyecto de planificación seleccionado, por ejemplo, metadatos DICOM.
2. Para abrir la radiografía 3D seleccionada en una aplicación SICAT o el proyecto de planificación seleccionado de la aplicación SICAT correspondiente, haga clic en el botón **Abrir**.
3. Para abrir el documento seleccionado en el visor estándar de PDF, haga clic en el botón **Abrir**.

PDF

4. Para exportar el estudio seleccionado de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Transferir**. Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 208 - Standalone*].
5. Para eliminar la radiografía 3D seleccionada o el proyecto de planificación seleccionado de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Eliminar**. Encontrará información sobre ello en *Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas* [▶ *Página 86 - Standalone*].
6. Encontrará información sobre la manera de modificar los atributos de la historia clínica activa en *Modificar los atributos de las historias clínicas* [▶ *Página 77 - Standalone*].



Si se abre una radiografía 3D sin estudio correspondiente y solamente se ha activado la licencia de una aplicación SICAT, se inicia dicha aplicación SICAT. Si se abre una radiografía 3D con varios estudios correspondientes y se han activado las licencias de varias aplicaciones SICAT, se inicia la aplicación cuyo estudio se haya modificado en último lugar.

21.5 MODIFICAR LOS ATRIBUTOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS




La combinación de atributos de cada historia clínica en el archivador de historias clínicas activo debe ser inequívoca.

Puede modificar los siguientes atributos de una historia clínica:

- **Apellidos**
- **Nombre**
- **Fecha de nacimiento**
- **ID del paciente**

Para modificar los atributos de las historias clínicas, haga lo siguiente:

- Ya hay una historia clínica activa. Encontrará información sobre ello en *Activar historias clínicas* [[Página 74 - Standalone](#)].

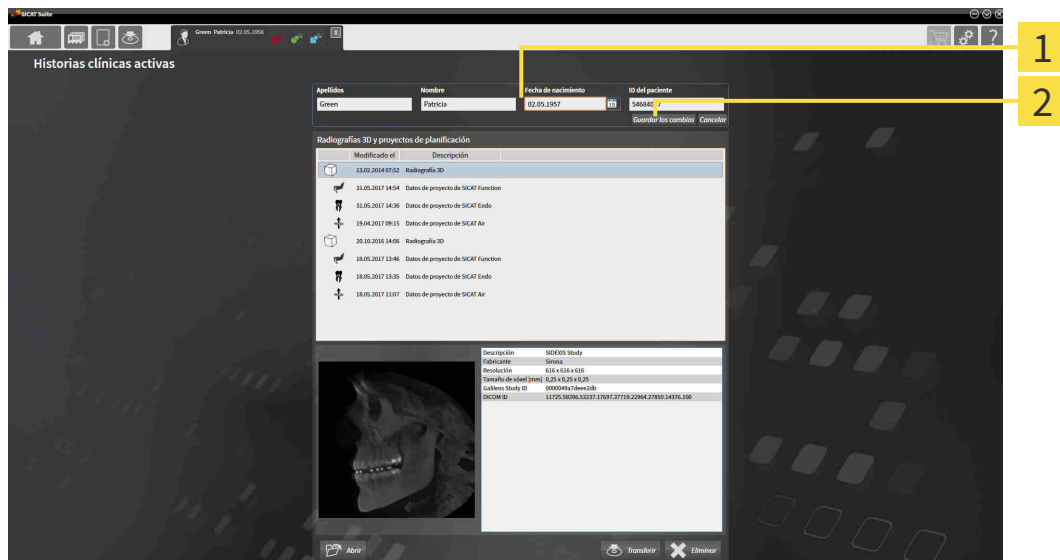

1 Campos de atributos

2 Botón **Guardar los cambios**


1. En la ventana **Historias clínicas activas**, escriba los valores deseados en los campos de los atributos.
2. Haga clic en el botón **Guardar los cambios**.

► SICAT Suite guarda las modificaciones.




La ID del paciente no se corresponde con la ID DICOM. Puede introducir cualquier ID que desee como ID del paciente, por ejemplo el número de la seguridad social o una ID de paciente interna de su consulta.


21.6 ABRIR RADIOGRAFÍAS 3D O PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DESDE LA VISTA GENERAL DE HISTORIAS CLÍNICAS

PRECAUCIÓN  **Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.**

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.

PRECAUCIÓN  **Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**


Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.

PRECAUCIÓN  **Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.

Para abrir una radiografía 3D o un proyecto de planificación desde la **Vista general de historias clínicas**, haga lo siguiente:

- La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 71 - Standalone*].

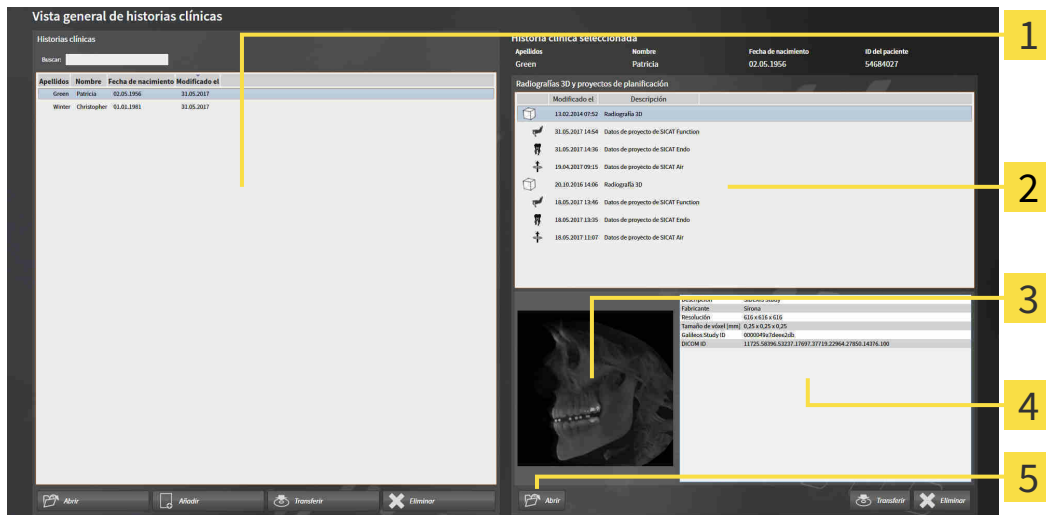

- 1** Lista **Historias clínicas**
- 2** Lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**
- 3** Área **Vista general**
- 4** Área **Detalles**
- 5** Botón **Abrir**

1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.
 - ▶ En el área **Historia clínica seleccionada**, la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** muestra todas las radiografías 3D, los proyectos de planificación y los archivos PDF de la historia clínica seleccionada.
2. En la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**, seleccione el juego de datos o documento deseado.
 - ▶ Las áreas **Vista general** y **Detalles** muestran información sobre el juego de datos o documento seleccionado.



3. Haga clic en el botón **Abrir**.

- ▶ Si ha seleccionado un juego de datos, este se abrirá en una aplicación SICAT.



- ▶ Si ha seleccionado un documento, este se abrirá en el visor de PDF predeterminado.



Si se abre una radiografía 3D sin estudio correspondiente y solamente se ha activado la licencia de una aplicación SICAT, se inicia dicha aplicación SICAT. Si se abre una radiografía 3D con varios estudios correspondientes y se han activado las licencias de varias aplicaciones SICAT, se inicia la aplicación cuyo estudio se haya modificado en último lugar.

21.7 ESTUDIOS SICAT ENDO EN SICAT SUITE



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.



PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

La **Vista general de historias clínicas** muestra información de estudios de SICAT Endo si se cumplen las siguientes condiciones:

- SICAT Suite se utiliza como versión independiente.
- Se ha seleccionado un estudio de SICAT Endo en el área **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**:

Apellidos: Yeager Nombre: Paul Fecha de nacimiento: 07.02.1976 ID del paciente: 82627458

Radiografías 3D y proyectos de planificación

Modificado el	Descripción
17.01.2017 07:52	Radiografía 3D
04.08.2017 15:36	Datos de proyecto de SICAT Endo
03.08.2017 11:00	Datos de proyecto de SICAT Function
03.08.2017 11:00	Datos de proyecto de SICAT Air

Radiografías intraorales registradas	1 Disponible
Impresiones ópticas	Disponible (17.01.2017)
Planificación del tratamiento de la raíz	Disponible (04.08.2017)
Pedido	No hay ningún pedido
Informe de SICAT Endo	No disponible.


Abrir Transferir Eliminar

1 Estudio de SICAT Endo seleccionado

2 Área **Vista general**

3 Área **Detalles**

El área **Vista general** muestra la vista **3D**:

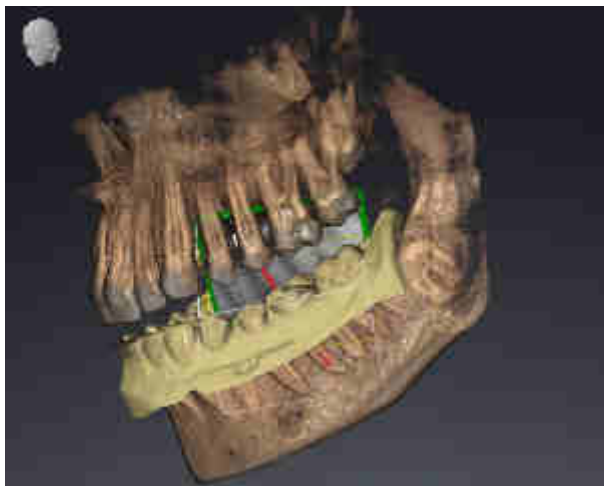

El área **Detalles** muestra la siguiente información:

- Disponibilidad de las radiografías intraorales registradas
- Disponibilidad de impresiones ópticas
- Disponibilidad de una planificación para el tratamiento del canal de la raíz
- Disponibilidad de un pedido con estado y fecha.
- Disponibilidad de un informe


21.8 CERRAR LAS HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVAS Y GUARDAR LOS PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN CONTENIDOS



Para cerrar una historia clínica activa y guardar los proyectos de planificación contenidos, haga lo siguiente:

- En el área de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ SICAT Suite cierra la historia clínica activa y guarda las modificaciones realizadas en los proyectos de planificación.

21.9 ELIMINAR HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS ARCHIVADORES DE HISTORIAS CLÍNICAS




PRECAUCIÓN

Si elimina historias clínicas, todas las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos también se eliminarán.

Elimine historias clínicas únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos.

Para eliminar una historia clínica junto con todas las radiografías 3D y proyectos de planificación contenidos, haga lo siguiente:

- La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 71 - Standalone*].

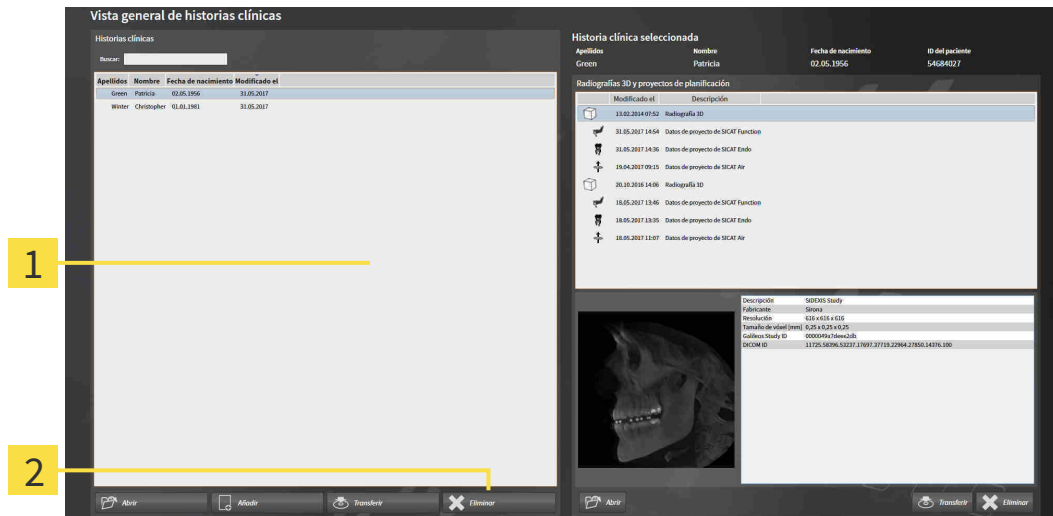


- 1** Lista **Historias clínicas**
- 2** Botón para eliminar la historia clínica seleccionada

1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.



2. Haga clic en el botón para eliminar la historia clínica seleccionada.
 - ▶ Se abre un mensaje de confirmación:

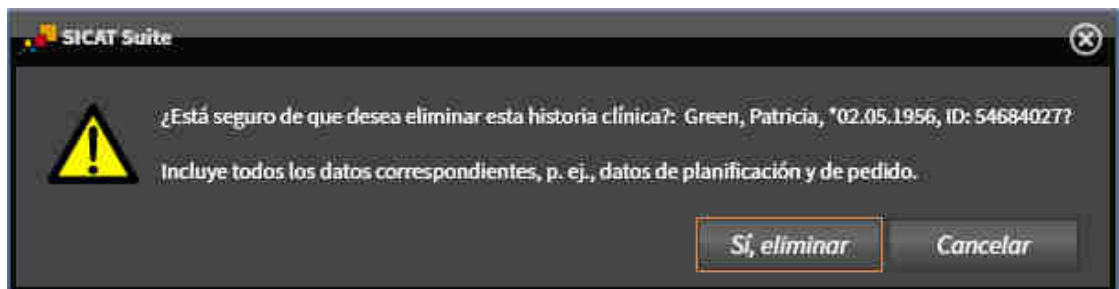

3. Si desea eliminar los datos seleccionados, haga clic en **Sí, eliminar** en el mensaje de confirmación.
- ▶ SICAT Suite elimina la historia clínica seleccionada junto con todas las radiografías 3D y los proyectos de planificación del archivador de historias clínicas activo, y los retira de la lista **Historias clínicas**.

21.10 ELIMINAR RADIOGRAFÍAS 3D O PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS

PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.


PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Para eliminar una radiografía 3D o un proyecto de planificación de una historia clínica, haga lo siguiente:

- La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará más información al respecto en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 71 - Standalone*].

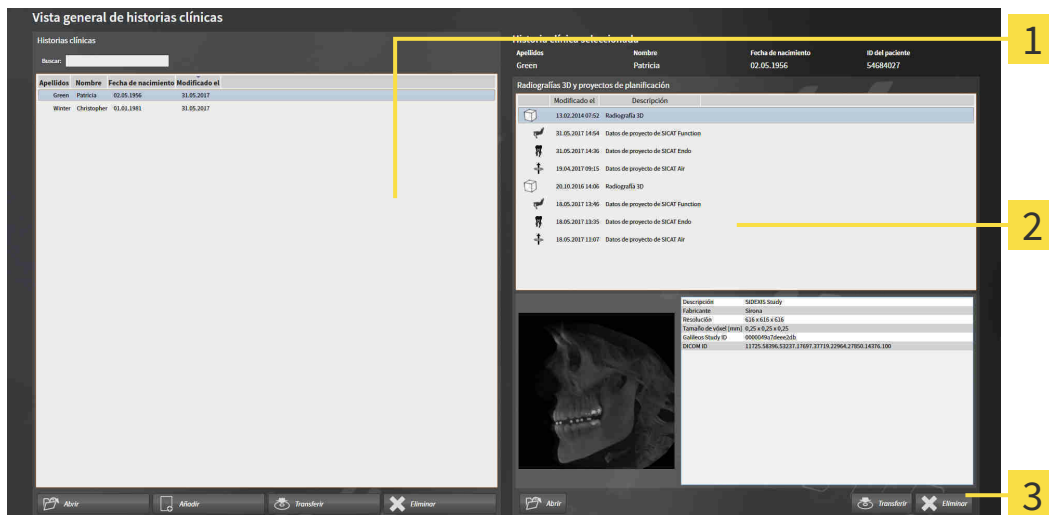

1 Lista **Historias clínicas**


2 Lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**

3 Botón **Eliminar**

1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.
 - ▶ En el área **Historia clínica seleccionada**, la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** muestra todas las radiografías 3D y proyectos de planificación de la historia clínica seleccionada.
2. Seleccione la radiografía 3D deseada o el proyecto de planificación deseado de la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**.



3. Haga clic en el botón **Eliminar**.
 - ▶ Se abre un mensaje de confirmación:

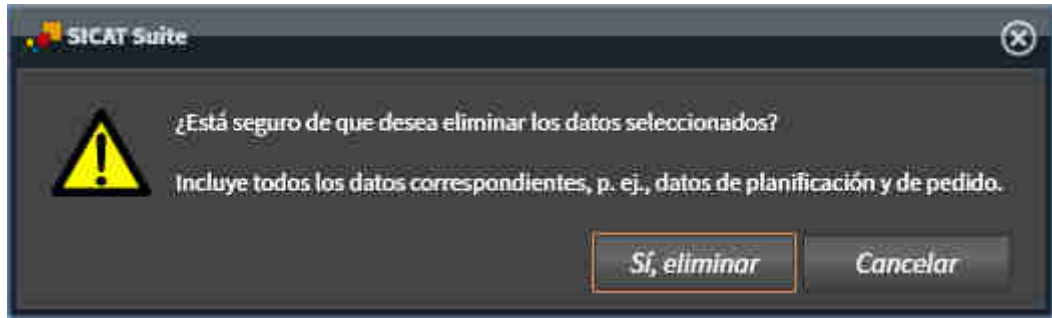


4. Si desea eliminar los datos seleccionados, haga clic en **Sí, eliminar** en el mensaje de confirmación.
 - ▶ SICAT Suite elimina la radiografía 3D seleccionada o el proyecto de planificación seleccionado en la historia clínica y en la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**.



También puede eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas en la ventana **Historias clínicas activas**. Encontrará más información al respecto en *Trabajar con historias clínicas activas* [▶ *Página 75 - Standalone*].

22 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT ENDO

La interfaz de usuario de SICAT Endo consta de las siguientes secciones:

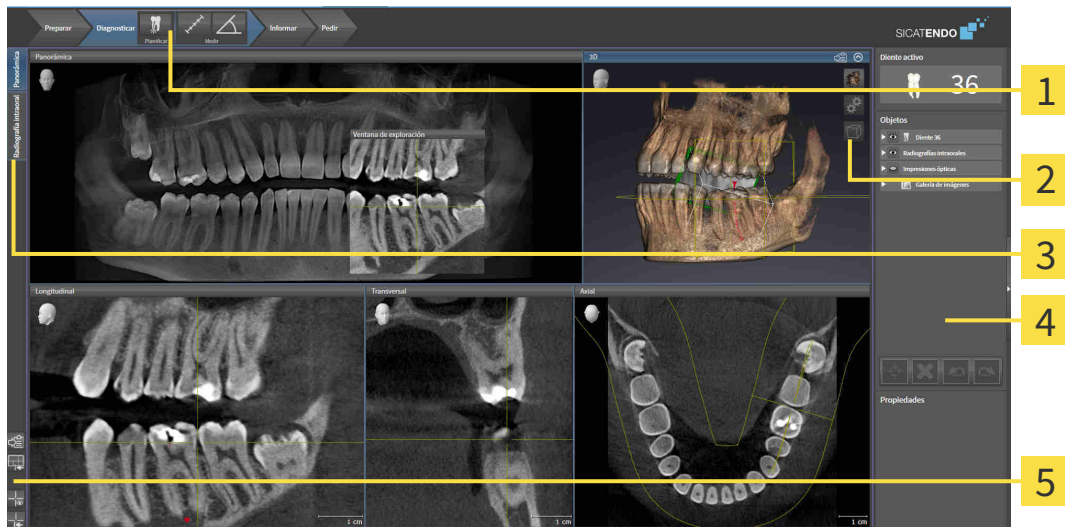

1 Barra de herramientas del flujo de trabajo

4 Barra de objetos

2 Barra de herramientas de la vista

5 Barra de herramientas del área de trabajo

3 Botones para cambiar de área de trabajo

- La **Barra de herramientas del flujo de trabajo** consta de distintos pasos de flujo de trabajo que contienen las herramientas principales del flujo de trabajo de la aplicación. Esto incluye herramientas con las que se pueden añadir e importar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 89 - Standalone*].
- La **Región del área de trabajo** es la parte de la interfaz de usuario situada debajo de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Muestra el área de trabajo activa de SICAT Endo. Cada área de trabajo contiene una combinación determinada de vistas. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 100 - Standalone*].
- La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista**. Contiene herramientas para ajustar la visualización de la vista respectiva. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 108 - Standalone*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 122 - Standalone*].
- La **Barra de objetos** contiene herramientas para administrar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información al respecto en *Barra de objetos* [▶ *Página 92 - Standalone*] y *Objetos de SICAT Endo* [▶ *Página 96 - Standalone*].
- La **Barra de herramientas del área de trabajo** contiene herramientas para modificar ajustes generales de áreas de trabajo y todas las vistas contenidas y para documentar el contenido de áreas de trabajo. Encontrará información al respecto en *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [▶ *Página 117 - Standalone*], *Restablecer vistas* [▶ *Página 120 - Standalone*], *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [▶ *Página 105 - Standalone*] y *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [▶ *Página 106 - Standalone*].

22.1 BARRA DE HERRAMIENTAS DEL FLUJO DE TRABAJO


En SICAT Endo, la **Barra de herramientas del flujo de trabajo** se compone de cuatro pasos de flujo de trabajo:

1. **Preparar**
2. **Diagnosticar**
3. **Informar**
4. **Pedir**

CONTRAER Y EXPANDIR PASOS DE FLUJO DE TRABAJO

Puede contraer y expandir los pasos de flujo de trabajo haciendo clic en ellos.

1. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «PREPARAR»

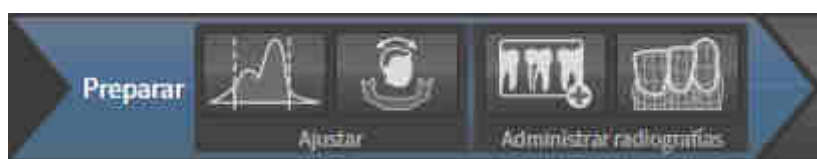

En el paso de flujo de trabajo **Preparar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Ajustar valores de gris** - Encontrará información sobre ello en *Ajustar valores de gris* [▶ [Página 130 - Standalone](#)]. Esta herramienta solamente está disponible y es necesaria para volúmenes de equipos que no son de Sirona.



- **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** - Encontrará información al respecto en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ [Página 134 - Standalone](#)] y *Ajustar el área panorámica* [▶ [Página 139 - Standalone](#)].



- **Administrando y registrando radiografías intraorales** Encontrará información al respecto en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ [Página 155 - Standalone](#)], *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ [Página 159 - Standalone](#)] y *Registrar la radiografía intraoral* [▶ [Página 161 - Standalone](#)].



- **Importar y registrar impresiones ópticas** - Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ [Página 143 - Standalone](#)].

2. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «DIAGNOSTICAR»



En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Planificando el tratamiento de la raíz con ayuda de EndoLines y canales de perforación** Encontrará información al respecto en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 178 - Standalone*], *Colocar EndoLines* [▶ *Página 180 - Standalone*] y *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 189 - Standalone*].



- **Añadir medición de distancias (D)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 196 - Standalone*].



- **Añadir medición de ángulo (A)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 197 - Standalone*].

3. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «INFORMAR»



En el paso de flujo de trabajo **Informar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Dibujar flecha** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 202 - Standalone*].



- **Dibujar círculo** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 202 - Standalone*].



- **Creando informe** - Encontrará información sobre ello en *Preparar impresos* [▶ *Página 205 - Standalone*].

4. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO «PEDIR»



En el paso de flujo de trabajo **Pedir** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)** - Encontrará información sobre ello en *Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra* [▶ *Página 212 - Standalone*].

22.2 BARRA DE OBJETOS



1 Navegador de objetos

2 Botón **Ocultar la barra de objetos** o botón **Mostrar la barra de objetos**

3 Barra de herramientas del objeto

4 Área **Propiedades**

La **Barra de objetos** contiene los siguientes elementos:

- El **Navegador de objetos** muestra una lista categorizada de todos los objetos de diagnóstico y los objetos planificados que ha añadido al estudio actual o que ha importado sobre este estudio. El **Navegador de objetos** agrupa objetos automáticamente. Por ejemplo, el grupo **Mediciones** contiene todos los objetos de medición. Puede contraer o expandir grupos de objetos, activar objetos y grupos de objetos y mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [► *Página 93 - Standalone*].
- La **Barra de herramientas del objeto** contiene herramientas para enfocar objetos, eliminar objetos o grupos de objetos y deshacer o rehacer acciones de objetos o de grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [► *Página 95 - Standalone*].
- El área **Propiedades** muestra los detalles del objeto activo.

Puede modificar la visibilidad de la **Barra de objetos** con dos botones en el lado derecho de la **Barra de objetos: Ocultar la barra de objetos** y **Mostrar la barra de objetos**

Los objetos que están disponibles en SICAT Endo se encuentran en *Objetos de SICAT Endo* [► *Página 96 - Standalone*].

22.3 GESTIONAR OBJETOS CON EL NAVEGADOR DE OBJETOS

CONTRAER Y EXPANDIR GRUPOS DE OBJETOS

Para contraer y expandir un grupo de objetos, haga lo siguiente:



El grupo de objetos deseado está expandido actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Contraer** situado junto al grupo de objetos deseado.
 - ▶ El grupo de objetos se contrae.



2. Haga clic en el símbolo **Expandir** situado junto al grupo de objetos deseado.
 - ▶ El grupo de objetos se expande.

ACTIVAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Algunas herramientas solo están disponibles para objetos o grupos de objetos activos.

Para activar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

El objeto o el grupo de objetos deseado está desactivado actualmente.

- Haga clic en el objeto o grupo de objetos deseado.
 - ▶ SICAT Endo desactiva un objeto o grupo de objetos previamente activado.
 - ▶ SICAT Endo activa el objeto o grupo de objetos deseado.
 - ▶ SICAT Endo destaca en color el objeto o grupo de objetos en el **Navegador de objetos** y en las vistas.



En las vistas 2D también es posible activar determinados objetos haciendo clic en ellos.

MOSTRAR Y OCULTAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS



Esta función solo está disponible para determinados tipos de objetos.

Para mostrar y ocultar un objeto o grupo de objetos, haga lo siguiente:

- El objeto o grupo de objetos deseado se muestra actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Mostrado** o en el símbolo **Algunos mostrados** junto al objeto o grupo de objetos deseado.



- ▶ SICAT Endo oculta el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Endo muestra el símbolo **Oculto** junto al objeto o grupo de objetos.



2. Haga clic en el símbolo **Oculto** situado junto al objeto o grupo de objetos deseado.

- ▶ SICAT Endo muestra el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Endo muestra el símbolo **Mostrado** junto al objeto o grupo de objetos.

22.4 GESTIONAR OBJETOS CON LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL OBJETO



Estas funciones solo están disponibles para determinados tipos de objetos.

ENFOCAR OBJETOS

Utilice esta función para buscar objetos en vistas.

Para enfocar un objeto, haga lo siguiente:

- ✓ El objeto deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*].



- Haga clic en el símbolo **Enfocar objeto activo (F)**.
- ▶ SICAT Endo desplaza el punto de enfoque de las vistas al objeto activo.
- ▶ SICAT Endo muestra el objeto activo en las vistas.



También puede enfocar objetos haciendo doble clic en ellos en el **Navegador de objetos** o en una vista que no sea la vista **3D**.

ELIMINAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Para eliminar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

- ✓ El objeto o grupo de objetos deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*].



- Haga clic en el símbolo **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)**.
- ▶ SICAT Endo elimina el objeto o grupo de objetos.

DESHACER Y REHACER ACCIONES DE OBJETOS

Para deshacer y rehacer la última acción de objeto o de grupo, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)**.
 - ▶ SICAT Endo deshace la última acción de objeto o de grupo.



2. Haga clic en el símbolo **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)**.
 - ▶ SICAT Endo rehace la última acción de objeto o de grupo deshecha.



Las opciones de deshacer y rehacer solamente están disponibles mientras está abierto un estudio en una aplicación SICAT.

22.5 OBJETOS DE SICAT ENDO

En **Navegador de objetos**, SICAT Endo agrupa grupos de objetos y objetos específicos de la aplicación de la siguiente manera:


- **Radiografías intraorales**
- **Impresiones ópticas**
- **Objeto planificado Endo**
 - **EndoLine**
 - **Canal de perforación**
- **Galería de imágenes**
 - **Imagen**
 - **Imagen de pantalla**

GRUPO DE OBJETOS DE LAS RADIOGRAFÍAS INTRAORALES



Después de importar y registrar las radiografías intraorales, SICAT Endo muestra un grupo de objetos **Radiografías intraorales** en el **Navegador de objetos**. Un grupo de objetos **Radiografías intraorales** contiene siempre como mínimo una radiografía intraoral. SICAT Endo muestra la fecha y la hora de adquisición para cada radiografía intraoral.

GRUPO DE OBJETOS DE IMPRESIONES ÓPTICAS

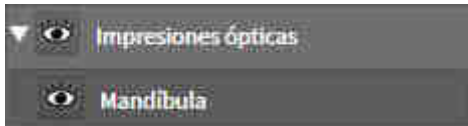

Después de importar y registrar al menos una impresión óptica, SICAT Endo muestra un grupo de objetos **Impresiones ópticas** en el **Navegador de objetos**. Un grupo de objetos **Impresiones ópticas** puede contener los siguientes objetos:

- **Maxilar**
- **Mandíbula**

Si se enfoca un objeto, SICAT Endo enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

Si se elimina un objeto **Maxilar** o un objeto **Mandíbula**, SICAT Endo elimina todas las impresiones ópticas del estudio.

GRUPO DE OBJETOS PLANIFICADOS ENDO



Después de haber planificado EndoLines y canales de perforación, SICAT Endo **muestra grupos de objetos planificados Endo** en el **Navegador de objetos**. Un **grupo de objetos planificados Endo** siempre está vinculado a los dientes y contiene los resultados del asistente de EndoLine en forma de EndoLines y canales de perforación. Un **grupo de objetos planificados Endo** contiene EndoLines como objetos y canales de perforación como subobjetos. Los canales de perforación están siempre enlazados a un EndoLine. Con ayuda de los canales de perforación, podrá planificar su tratamiento de endodoncia.

Si se enfoca uno de los objetos o subobjetos, SICAT Endo enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

GRUPO DE OBJETOS DE LA GALERÍA DE IMÁGENES



Para el grupo de objetos **Galería de imágenes** se aplica lo siguiente:



- Si sitúa el puntero del ratón sobre un grupo de objetos **Galería de imágenes**, SICAT Endo muestra un símbolo de una rueda dentada. Al hacer clic en ese símbolo, SICAT Endo abre la ventana **Creación del informe**.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un grupo de objetos **Galería de imágenes**. SICAT Endo elimina todos los objetos de **Imagen** correspondientes y los objetos **Imagen de pantalla**.

OBJETOS DE IMÁGENES



Para los objetos **Imagen** se aplica lo siguiente:

- **Imagen** Los objetos están debajo de los grupos de objetos **Galería de imágenes**.
- SICAT Endo Para cada vista 2D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de un corte y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- SICAT Endo para la vista 3D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de una determinada posición y un determinado factor de zoom y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar las funciones **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)** y **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)** para anotaciones individuales.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen** y, con él, todas las anotaciones que contenga a la vez. SICAT Endo elimina los objetos **Imagen** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Creación del informe**.
- Si enfoca un objeto **Imagen**, SICAT Endo crea la vista correspondiente para el momento en que haya creado la última anotación contenida.

OBJETOS DE CAPTURAS DE PANTALLA



Para los objetos **Imagen de pantalla** se aplica lo siguiente:

- **Imagen de pantalla** Los objetos están debajo de los grupos de objetos **Galería de imágenes**.
- SICAT Endo crea un objeto **Imagen de pantalla** por cada captura de pantalla.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen de pantalla**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen de pantalla**. SICAT Endo elimina los objetos **Imagen de pantalla** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Creación del informe**.
- Si enfoca un objeto **Imagen de pantalla**, SICAT Endo crea la vista correspondiente para el momento en que se crea el objeto.
- Las funciones de mostrar y ocultar no están disponibles.

23 ÁREAS DE TRABAJO

Las aplicaciones SICAT representan estudios en distintas vistas y disponen combinaciones de vistas en áreas de trabajo.

En **SICAT Endo** hay dos áreas de trabajo distintas:

- Área de trabajo **panorámica**: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo panorámica* [▶ *Página 101 - Standalone*].
- Área de trabajo de la **radiografía intraoral**: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo de la radiografía intraoral* [▶ *Página 103 - Standalone*].


Las siguientes acciones están disponibles para las áreas de trabajo y las vistas contenidas:

- *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 104 - Standalone*].
- *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [▶ *Página 105 - Standalone*].
- *Ajustar las vistas* [▶ *Página 108 - Standalone*].
- Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 122 - Standalone*].
- Es posible documentar el contenido del área de trabajo activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [▶ *Página 106 - Standalone*].

Panorámica

Radiografía Intraoral

23.1 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO PANORÁMICA

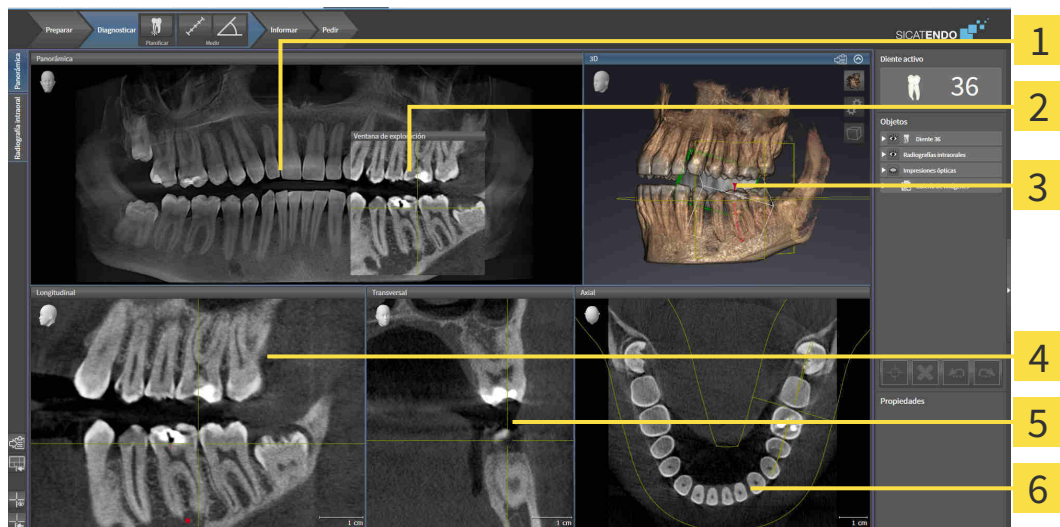

1 Panorámica Vista

2 Ventana explor

3 3D Vista

4 Longitudinal Vista

5 Transversal Vista

6 Axial Vista

VISTA PANORÁMICA

La vista **Panorámica** se corresponde con un ortopantomograma virtual (OPG). Muestra una proyección ortogonal a la curva panorámica con un grosor determinado. Puede ajustar la curva panorámica y el grosor a ambos maxilares. Encontrará más información al respecto en *Ajustar el área panorámica* [► *Página 139 - Standalone*].

VENTANA EXPLOR.

La **Ventana explor** está incrustada en la vista **Panorámica**. Añade la tercera dimensión a la vista **Panorámica** mostrando cortes en paralelo a la curva panorámica. Puede mostrar y ocultar la **Ventana explor**. Encontrará más información al respecto en *Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración* [► *Página 118 - Standalone*].

VISTA 3D

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

VISTA LONGITUDINAL

La vista **Longitudinal** muestra cortes tangenciales con respecto a la curva panorámica.

VISTA TRANSVERSAL


La vista **Transversal** muestra cortes ortogonales con respecto a la curva panorámica.

VISTA AXIAL

De forma predeterminada, la vista **Axial** muestra cortes desde arriba. Puede cambiar la posición de la vista **Axial**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 232 - Standalone*].

Encontrará las funciones de las vistas en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 108 - Standalone*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 122 - Standalone*].

23.2 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

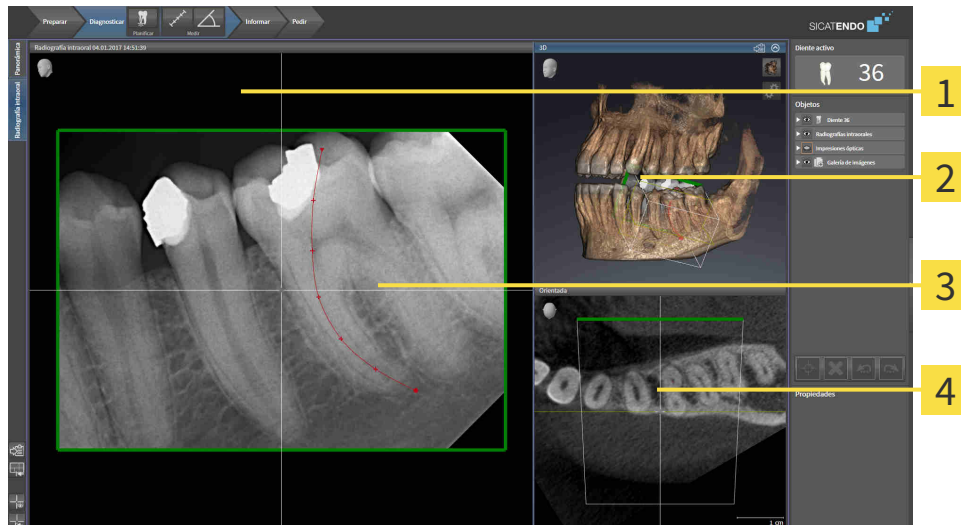

1 Radiografía intraoral Vista

2 3D Vista

3 Ventana de exploración

4 Orientada Vista

RADIOGRAFÍA INTRAORAL VISTA

La vista **Radiografía intraoral** muestra la radiografía intraoral seleccionada en el navegador de objetos.

VENTANA EXPLOR.

La **Ventana explor** está incrustada en la vista **Radiografía intraoral**. Añade la tercera dimensión a la vista **Radiografía intraoral** mostrando cortes en paralelo a la radiografía intraoral. Puede mostrar u ocultar la **Ventana explor** y utilizarla para comprobar el registro o evaluar canales de raíces.

3DVISTA

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

ORIENTADA VISTA

De forma estándar, la vista **Orientada** muestra un corte por la radiografía intraoral que se define por la posición del retículo en la vista **Radiografía intraoral**.

23.3 CAMBIAR EL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para cambiar el área de trabajo activa, haga lo siguiente:



- En la esquina superior izquierda de la región del área de trabajo, haga clic en la pestaña del área de trabajo deseada.
- ▶ Se abre el área de trabajo seleccionada.


23.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL FORMATO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

AJUSTAR EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para ajustar el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el límite entre dos o varias vistas.

► El puntero del ratón se transforma:

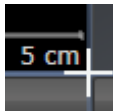

2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - La posición del límite cambia.
 - Se cambian los tamaños de las vistas en todos los lados del límite.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo conserva la posición actual del límite y los tamaños actuales de las vistas en todos los lados del límite.

RESTABLECER EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para restablecer el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:



- Haga clic en el símbolo **Restablecer el formato del área de trabajo activa** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.
- SICAT Endo restablece el área de trabajo activa al formato estándar. Esto significa que el software muestra todas las vistas en sus tamaños estándar.

23.5 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE ÁREAS DE TRABAJO

A efectos de documentación, puede copiar capturas de pantalla de las áreas de trabajo en el portapapeles de Windows.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UN ÁREA DE TRABAJO EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar la captura de pantalla de un área de trabajo en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- El área de trabajo deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [► *Página 104 - Standalone*].



- En la barra de herramientas del área de trabajo, haga clic en el símbolo **Copiar captura de pantalla del área de trabajo activa en el portapapeles**.
- SICAT Endo copia una captura de pantalla del área de trabajo en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl +V.

24 VISTAS

Las vistas están incluidas en las áreas de trabajo. Encontrará una descripción de las distintas áreas de trabajo y vistas en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 100 - Standalone*].

Puede ajustar las vistas. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 108 - Standalone*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 122 - Standalone*].

24.1 AJUSTAR LAS VISTAS

Algunas herramientas para ajustar las vistas solo están disponibles para la vista activa. Encontrará la manera de activar una vista en *Cambiar la vista activa* [► *Página 110 - Standalone*].

Una vista activa contiene los siguientes elementos:



- 1** Barra de título
- 2** Cabezal de orientación
- 3** Barra de herramientas de la vista
- 4** Retículo
- 5** Escala

Las vistas de corte 2D muestran retículos. Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte. SICAT Endo sincroniza todas las vistas de corte entre sí. Esto significa que todos los retículos apuntan a la misma posición dentro de los datos radiográficos 3D. Con ello podrá asignar estructuras anatómicas más allá de las vistas.

La vista **3D** muestra los marcos que visualizan las posiciones actuales de las vistas de corte 2D.

Para ajustar las vistas están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 110 - Standalone*]
- *Maximizar y restablecer vistas* [▶ *Página 112 - Standalone*]
- *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 113 - Standalone*]
- *Ampliar vistas y desplazar secciones* [▶ *Página 115 - Standalone*]
- *Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D* [▶ *Página 116 - Standalone*]
- *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [▶ *Página 117 - Standalone*]
- *Desplazar, ocultar y visualizar la ventana de exploración* [▶ *Página 118 - Standalone*]
- *Restablecer vistas* [▶ *Página 120 - Standalone*]

Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 122 - Standalone*].


Puede documentar el contenido de una vista activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de vistas* [▶ *Página 121 - Standalone*].

24.2 CAMBIAR LA VISTA ACTIVA

La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista** y la barra de título.

Para activar una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada:

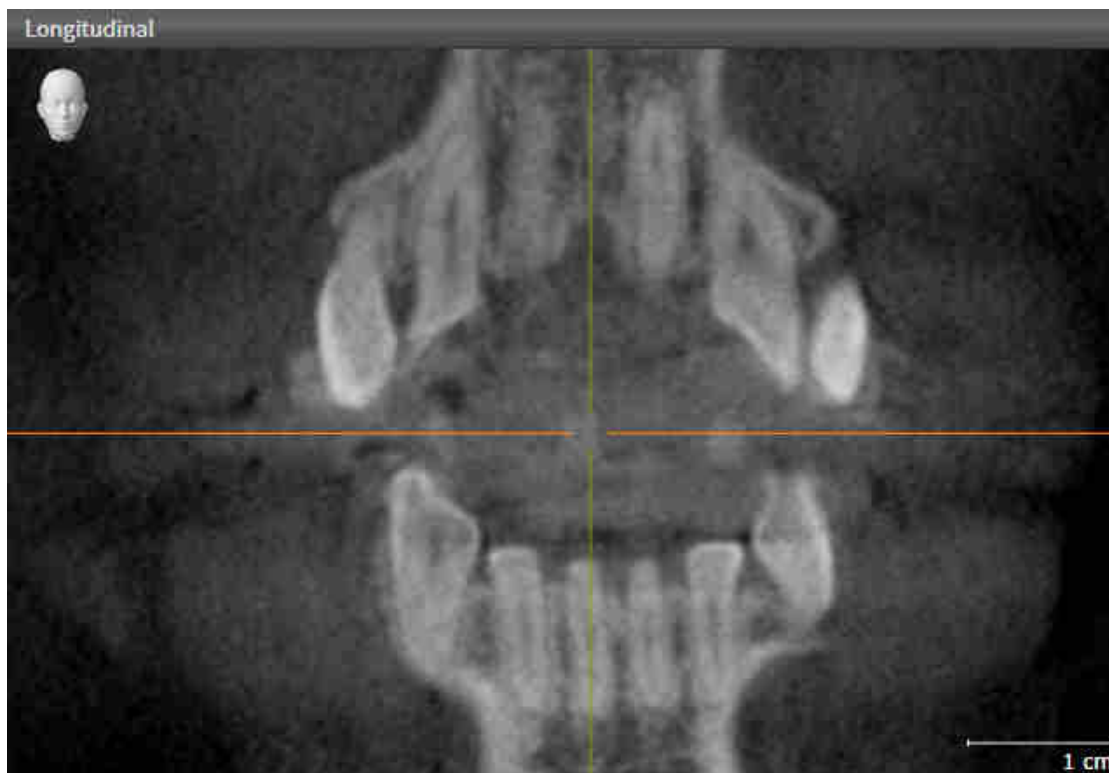

2. Haga clic en la vista que desee.

► SICAT Endo activa la vista:



La vista activa se reconoce porque la barra de título es de color naranja.

24.3 MAXIMIZAR Y RESTABLECER VISTAS

Para maximizar una vista y restablecer su tamaño anterior, haga lo siguiente:

- ☑ La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 110 - Standalone*].
- ☑ La vista deseada no está maximizada.



1. En la barra de título de la vista deseada, haga clic en el símbolo **Maximizar**.

▶ SICAT Endo maximiza la vista.



2. En la barra de título de la vista maximizada, haga clic en el símbolo **Restaurar**.

▶ SICAT Endo restablece el tamaño anterior de la vista.



Para maximizar las vistas y restablecer su tamaño anterior, están disponibles las siguientes alternativas:

- Para maximizar una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista deseada.
- Para restablecer el tamaño anterior de una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista maximizada.

24.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL BRILLO Y EL CONTRASTE DE LAS VISTAS 2D

Para ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D, haga lo siguiente:

- ☑ La vista 2D deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 110 - Standalone*].



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista 2D, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Ajustar brillo y contraste**.

▶ Se abre la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**:



2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Brillo**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ SICAT Endo adapta el brillo de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Brillo**.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el brillo actual de la vista 2D.



5. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Contraste**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ SICAT Endo adapta el contraste de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Contraste**.
7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el contraste actual de la vista 2D.
8. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**.
 - ▶ La ventana transparente **Ajustar brillo y contraste** se cierra.

Para restablecer el brillo y el contraste de la vista 2D a los valores estándar, puede hacer clic en el símbolo **Restablecer brillo y contraste**.



El brillo y el contraste de todas las vistas de corte 2D están adaptados entre sí.

24.5 AMPLIAR VISTAS Y DESPLAZAR SECCIONES

AMPLIAR UNA VISTA

La opción de zoom amplía o reduce el contenido de una vista.

Para aplicar el zoom en una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Gire la rueda del ratón hacia delante.
▶ La vista se ampliará.
3. Gire la rueda del ratón hacia atrás.
▶ La vista se reducirá.



Como alternativa, puede pulsar la rueda del ratón y mover el ratón hacia arriba o hacia abajo para reducir o ampliar la vista.

DESPLAZAR LA SECCIÓN DE UNA VISTA

Para desplazar la sección de una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón derecho del ratón.
▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
▶ La sección de la vista se desplaza según el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón derecho del ratón.
▶ SICAT Endo mantiene la sección actual de la vista.

24.6 DESPLAZARSE POR LOS CORTES DE LAS VISTAS DE CORTE 2D

Para desplazarse por los cortes de una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una flecha bidireccional.
3. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ A excepción del corte **Transversal**, los cortes se mueven de forma paralela.
 - ▶ El corte **Transversal** se mueve a lo largo de la curva panorámica.
 - ▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el corte actual.

24.7 MOVER, OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS

MOVER UN RETÍCULO

Para mover el retículo en una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.

1. En la vista que desee, sitúe el puntero del ratón en el centro del retículo.

▶ El puntero del ratón se transforma en un retículo:



2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3. Desplace el ratón.

▶ El retículo de la vista sigue el movimiento del ratón.

▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.

▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.

4. Suelte el botón izquierdo del ratón.

▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del retículo.



Para desplazar de inmediato el retículo a la posición de puntero del ratón, también puede hacer doble clic en una vista 2D.

OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS

Para ocultar y mostrar todos los retículos y los marcos, haga lo siguiente:

Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.



1. Haga clic en el símbolo **Ocultar retículos y marcos** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.

▶ SICAT Endo oculta los retículos en todas las vistas de corte 2D.

▶ SICAT Endo oculta los marcos en la vista **3D**.



2. Haga clic en el símbolo **Mostrar retículos y marcos**.

▶ SICAT Endo muestra los retículos en todas las vistas de corte 2D.

▶ SICAT Endo muestra los marcos en la vista **3D**.

24.8 DESPLAZAR, OCULTAR Y VISUALIZAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN

DESPLAZAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN

Para desplazar la **Ventana explor**, haga lo siguiente:

- El área de trabajo **Panorámica** o el área de trabajo **Radiografía intraoral** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 104 - Standalone*].
- La **Ventana explor** ya se muestra:



1. En la vista **Panorámica** o en la vista **Radiografía intraoral**, sitúe el puntero del ratón sobre la barra de título **Ventana explor**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una mano.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La **Ventana explor** sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la **Ventana explor**.

OCULTAR Y MOSTRAR LA VENTANA DE EXPLORACIÓN



El icono que indica si la **Ventana explor** se está mostrando o está oculta es a la vez indicador de estado e interruptor.

Para ocultar y mostrar la **Ventana explor**, haga lo siguiente:

- El área de trabajo **Panorámica** o el área de trabajo **Radiografía intraoral** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el área de trabajo activa* [▶ *Página 104 - Standalone*].
- La **Ventana explor** ya se muestra.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **Panorámica** o de la vista **Radiografía intraoral**, haga clic en el símbolo **Ocultar la ventana de exploración**.

▶ SICAT Endo oculta la **Ventana explor**.



2. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **Panorámica** o de la vista **Radiografía intraoral**, haga clic en el símbolo **Mostrar la ventana de exploración**.

▶ SICAT Endo muestra la **Ventana explor**.

24.9 RESTABLECER VISTAS

Para restablecer todas las vistas, haga lo siguiente:



- En la **Barra de herramientas del área de trabajo**, haga clic en el icono **Restablecer vistas**.
- ▶ SICAT Endo restablece en todas las vistas los valores estándar para el zoom, el desplazamiento de las secciones, el desplazamiento, el desplazamiento de los retículos y el desplazamiento de la **Ventana explor**.
- ▶ SICAT Endo restablece la posición de la vista **3D** al valor estándar.

24.10 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE VISTAS

A efectos de documentación, puede realizar capturas de pantalla de las vistas y enviarlas de las siguientes maneras:

- Copiar en el portapapeles de Windows.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UNA VISTA EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar una captura de pantalla de una vista en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 110 - Standalone*].



- En la barra de título de la vista, haga clic en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

- ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla de la vista en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl+V.

25 ADAPTAR LA VISTA 3D

Puede modificar la posición de la vista **3D** en cualquier momento. Encontrará información sobre ello en *Modificar la posición de la vista 3D* [▶ *Página 123 - Standalone*].

Para configurar la vista **3D**, están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 124 - Standalone*]
- *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 125 - Standalone*]
- *Girar la vista 3D* [▶ *Página 186 - Standalone*]

25.1 MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D

Existen dos opciones para modificar la posición de la vista **3D**:

- Realizar una modificación interactiva
- Seleccionar la posición estándar de la vista.

MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D DE FORMA INTERACTIVA

Para modificar la posición de la vista **3D** de forma interactiva, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista **3D**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una mano.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ La posición de la vista se modifica según el movimiento del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la vista **3D**.

SELECCIONAR LA POSICIÓN ESTÁNDAR DE LA VISTA.

Para seleccionar la posición estándar en la vista **3D**, haga lo siguiente:



1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior izquierda de la vista **3D** sobre el símbolo Cabezal de orientación.
 - ▶ Se abre la ventana transparente **Posición de la vista**:



- ▶ En el centro de la ventana transparente **Posición de la vista** se encuentra el Cabezal de orientación destacado, que indica la posición actual de la vista.
2. Haga clic en el símbolo del Cabezal de orientación que indica la posición estándar deseada.
 - ▶ La posición de la vista **3D** se modifica según su selección.
 3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Posición de la vista**.
 - ▶ La ventana transparente **Posición de la vista** se cierra.

25.2 CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA VISTA 3D




Todos los modos de visualización están disponibles en todas las áreas de trabajo.

Para cambiar el modo de visualización de la vista **3D**, haga lo siguiente:

La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 110 - Standalone*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar modo de visualización**.

► Se abre la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**:

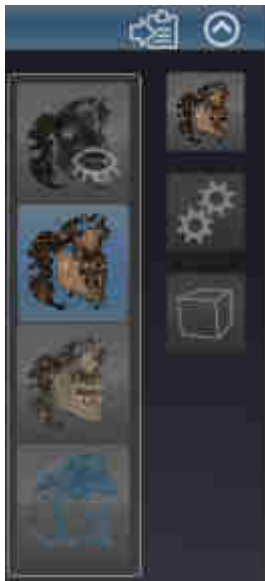

2. Haga clic en el símbolo del modo de visualización que desee.

► SICAT Endo activa el modo de visualización deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**.

► La ventana transparente **Cambiar modo de visualización** se cierra.

25.3 CONFIGURAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN ACTIVO DE LA VISTA 3D



Tan solo los modos de visualización configurables muestran el icono **Configurar modo de visualización activo**. La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** muestra tan solo los ajustes que son relevantes para el modo de visualización activo.

Para configurar el modo de visualización activo de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ☑ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 110 - Standalone*].
- ☑ El modo de visualización deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 124 - Standalone*].
- ☑ El modo de visualización activo es configurable.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Configurar modo de visualización activo**.

▶ Se abre la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**:



2. Desplace la corredera que desee.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
3. Haga clic en el símbolo de flecha junto a **Ajustes avanzados**, si está disponible.
 - ▶ Se abre el área **Ajustes avanzados**.
4. Active o desactive las casillas de comprobación disponibles.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según el estado de las casillas de comprobación.
5. Desplace la corredera que desee.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
6. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**.
 - ▶ La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** se cierra.



Puede restablecer los ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Restablecer el ajuste predeterminado de la configuración del modo de visualización activo**.



Puede guardar los ajustes actuales como ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Guardar la configuración del modo de visualización activo como ajuste predeterminado**.

25.4 CAMBIAR EL MODO DE DETALLE DE LA VISTA 3D

Para cambiar el modo de detalle de la vista **3D**, haga lo siguiente:

La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 110 - Standalone*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar el modo de detalle**.

▶ Se abre la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**:



2. Haga clic en el símbolo del modo de detalle deseado.

▶ SICAT Endo activa el modo de detalle deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**.


▶ La ventana transparente **Cambiar el modo de detalle** se cierra.

26 VALORES DE GRIS



Solo se pueden ajustar los valores de gris en volúmenes creados con equipos de rayos X 3D que no sean Sirona.

Si la visualización del volumen no es suficiente, puede ajustar los valores de gris del volumen en la ventana **Ajustar valores de gris**:

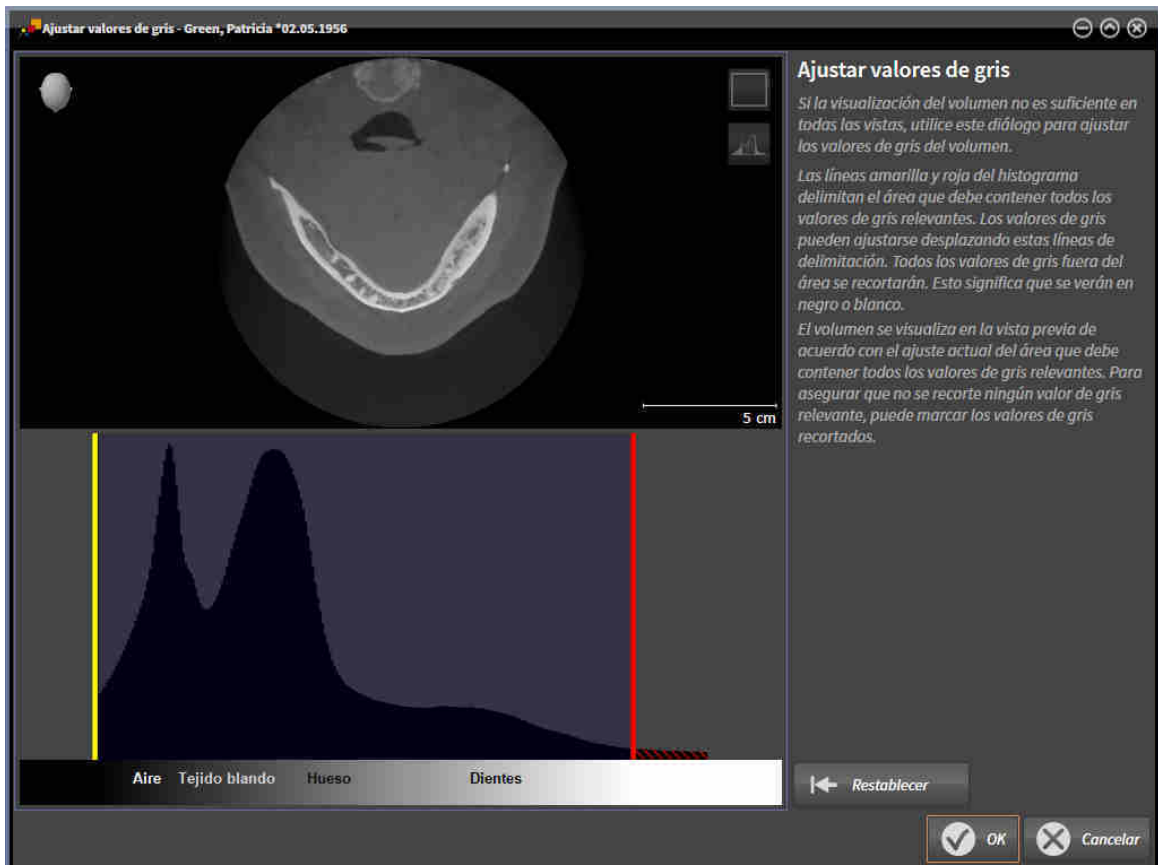

La ventana **Ajustar valores de gris** consta de dos secciones:

- La parte superior muestra una vista de corte **Axial** o una vista de proyección **Coronal**.
- La parte inferior muestra un histograma con la distribución de frecuencia de los valores de gris.

Las líneas amarilla y roja del histograma delimitan el área que debe contener todos los valores de gris relevantes. Los valores de gris pueden ajustarse desplazando estas delimitaciones. SICAT Endo corta todos los valores de gris fuera del área. Esto quiere decir que el software los representa en blanco o negro.

SICAT Endo delimita el volumen en la vista de corte **Axial** o en la vista de proyección **Coronal** en función del área que debe contener todos los valores de gris relevantes. Para asegurarse de que SICAT Endo no oculte ninguna información relevante sobre la imagen, el software puede marcar los valores de gris recortados.

En la vista de corte **Axial** puede desplazarse por los cortes y comprobar los valores de gris recortados en cada uno.

En la vista de proyección **Coronal** puede comprobar de una vez los valores de gris recortados en todos los cortes.

Ajuste los valores de gris solo si la visualización del volumen no es suficiente en todas las vistas. Encontrará información sobre ello en *Ajustar valores de gris* [▶ *Página 130 - Standalone*].

Para destacar determinadas estructuras anatómicas, por ejemplo, es posible ajustar temporalmente el brillo y el contraste de las vistas 2D. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 113 - Standalone*].

Asimismo, se puede ajustar la visualización de la vista **3D**. Encontrará información al respecto en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 124 - Standalone*], *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 125 - Standalone*] y *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [▶ *Página 127 - Standalone*].

26.1 AJUSTAR VALORES DE GRIS

Encontrará información general sobre los valores de gris en *Valores de gris* [▶ *Página 128 - Standalone*].


Para ajustar los valores de gris del volumen, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Ajustar valores de gris**.

▶ Se abre la ventana **Ajustar valores de gris**:

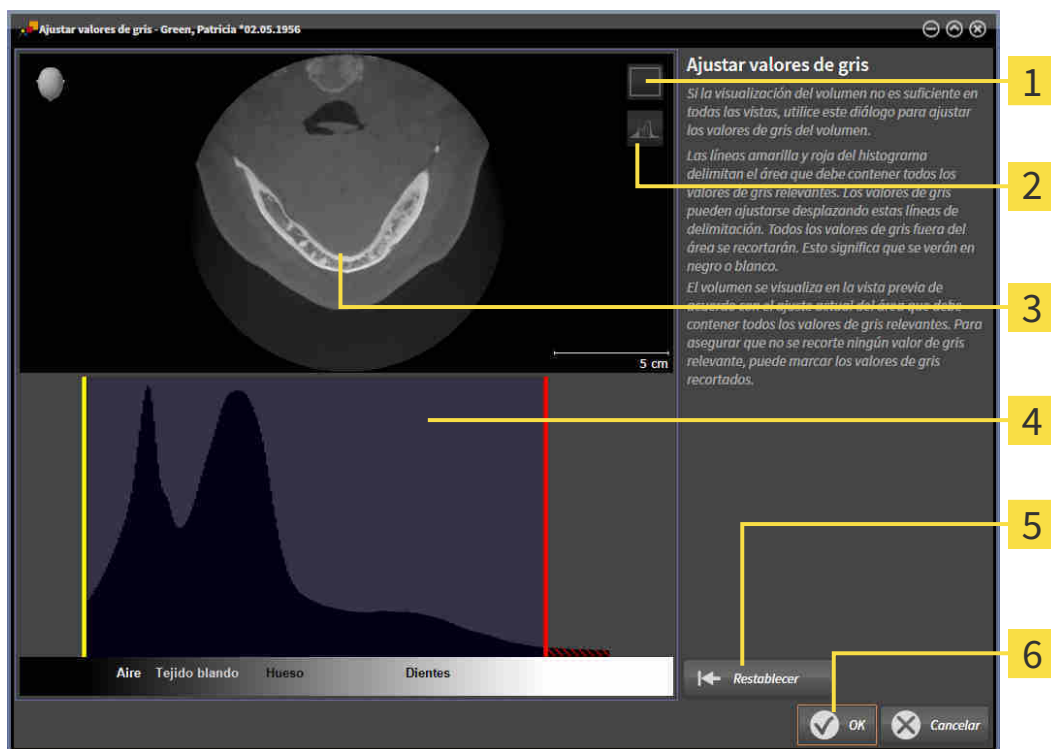

- 1 Símbolo **Activar el modo de proyección coronal** o símbolo **Activar el modo de corte axial**
- 2 Símbolo **No marcar los valores de gris recortados** o símbolo **Marcar los valores de gris recortados**
- 3 **Axial**Vista de corte o vista de proyección **Coronal**
- 4 Histograma
- 5 Botón **Restablecer**
- 6 Botón **OK**

2. Asegúrese de que el modo de corte axial está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte axial**.
3. Para ajustar el límite inferior del área que debe contener todos los valores de gris relevantes, desplace la línea amarilla.
 - ▶ SICAT Endo ajusta todos los valores de gris de la vista de corte **Axial** correspondientemente.
 - ▶ SICAT Endo marca en amarillo todos los valores de gris que estén por debajo del valor de gris relevante más bajo.

4. Desplácese por los cortes axiales. Asegúrese de que los valores de gris relevantes no estén marcados en amarillo. En caso necesario, vuelva a desplazar la línea amarilla.
 5. Para ajustar el límite superior del área que debe contener todos los valores de gris relevantes, desplace la línea roja.
 - ▶ SICAT Endo ajusta todos los valores de gris de la vista de corte **Axial** correspondientemente.
 - ▶ SICAT Endo marca en rojo todos los valores de gris que estén por encima del valor de gris relevante más alto.
 6. Desplácese por los cortes axiales. Asegúrese de que los valores de gris relevantes no estén marcados en rojo. En caso necesario, vuelva a desplazar la línea roja.
 7. Haga clic en **OK**.
- ▶ La ventana **Ajustar valores de gris** se cierra y SICAT Endo muestra el volumen en todas las vistas según los valores de gris ajustados.

Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar valores de gris** están disponibles las siguientes acciones:



- Para evaluar todos los cortes de una vez, haga clic en el icono **Activar el modo de proyección coronal**. Haciendo clic en el icono **Activar el modo de corte axial** vuelve a cambiar a la vista de corte **Axial**.
- Puede desplazar de una vez ambos límites haciendo clic en el área que debe contener todos los valores de gris relevantes y desplazándola.
- Para restablecer a los ajustes predeterminados el área que debe contener todos los valores de gris relevantes, haga clic en el botón **Restablecer**.
- Si no desea marcar los valores de gris recortados, haga clic en el icono **No marcar los valores de gris recortados**.
- Si no desea guardar los cambios, haga clic en **Cancelar**.

27 ALINEACIÓN DE VOLUMEN Y ÁREA PANORÁMICA



Si es necesario adaptar la alineación del volumen, hágalo cuando comience a trabajar con la radiografía 3D. Si la alineación del volumen se adapta más tarde, quizá sea necesario repetir partes del diagnóstico o de la planificación.

ALINEACIÓN DE VOLUMEN

Es posible adaptar la alineación del volumen para todas las vistas girando el volumen en torno a los tres ejes principales. Esto puede resultar útil en los siguientes casos:


- El paciente no tiene una posición óptima en la radiografía 3D
- La alineación se corresponde al caso de aplicación, por ejemplo, alineación de los cortes axiales en paralelo a la horizontal de Frankfurt o en paralelo al plano oclusal
- Optimización de la vista panorámica.

Si la alineación del volumen se ajusta en SICAT Endo, los cambios se aplican al resto de aplicaciones SICAT.

La manera de ajustar la alineación del volumen se explica en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 134 - Standalone*].

ÁREA PANORÁMICA

SICAT Endo calcula la vista **Panorámica** a partir del volumen y del área panorámica. Para optimizar la vista **Panorámica** debe ajustar el área panorámica en los dos maxilares del paciente. Esto es importante para un diagnóstico y una planificación del tratamiento efectivos y eficientes.

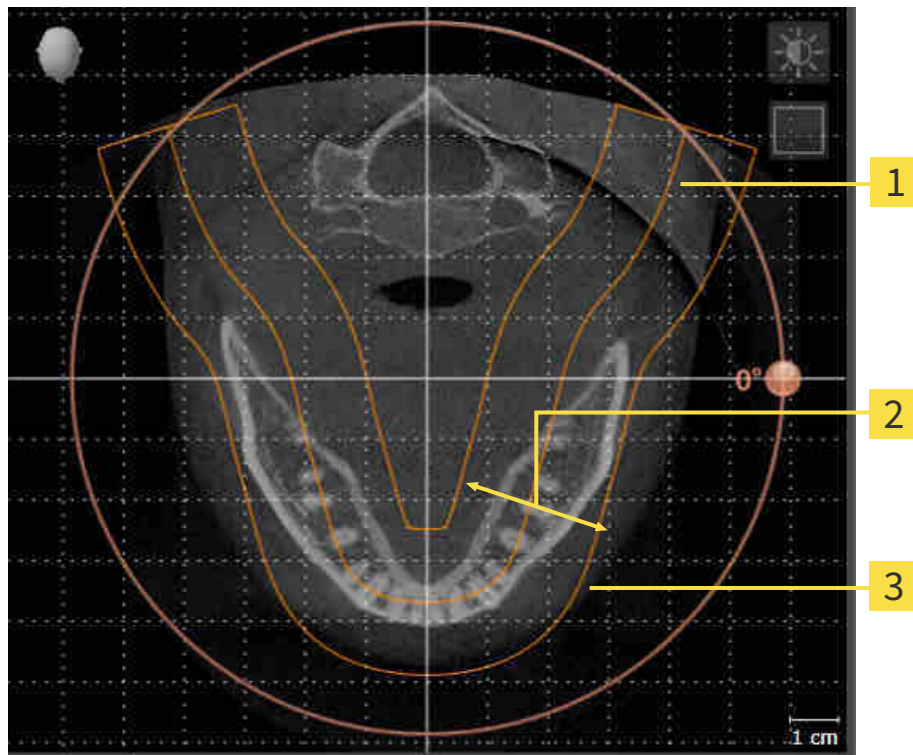

1 Curva panorámica

2 Grosor

3 Área panorámica

El área panorámica se determina mediante estos dos componentes:

- Forma y posición de la curva panorámica
- Grosor del área panorámica.

Para ajustar de forma óptima el área panorámica, deben cumplirse estas dos condiciones:

- El área panorámica debe contener por completo todos los dientes y los dos maxilares.
- El área panorámica debe ser lo más estrecha posible.

Si el área panorámica se ajusta en SICAT Endo, los cambios se aplican al resto de aplicaciones SICAT.

Encontrará la manera de ajustar el área panorámica en *Ajustar el área panorámica* [►Página 139 - Standalone].

27.1 AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN

Encontrará información general sobre la alineación del volumen en *Alineación de volumen y área panorámica* [► *Página 132 - Standalone*].

El ajuste de la alineación del volumen consta de los siguientes pasos:


- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Girar el volumen en la vista **Coronal**
- Girar el volumen en la vista **Sagital**
- Girar el volumen en la vista **Axial**

ABRIR LA VENTANA AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA

El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.
- Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

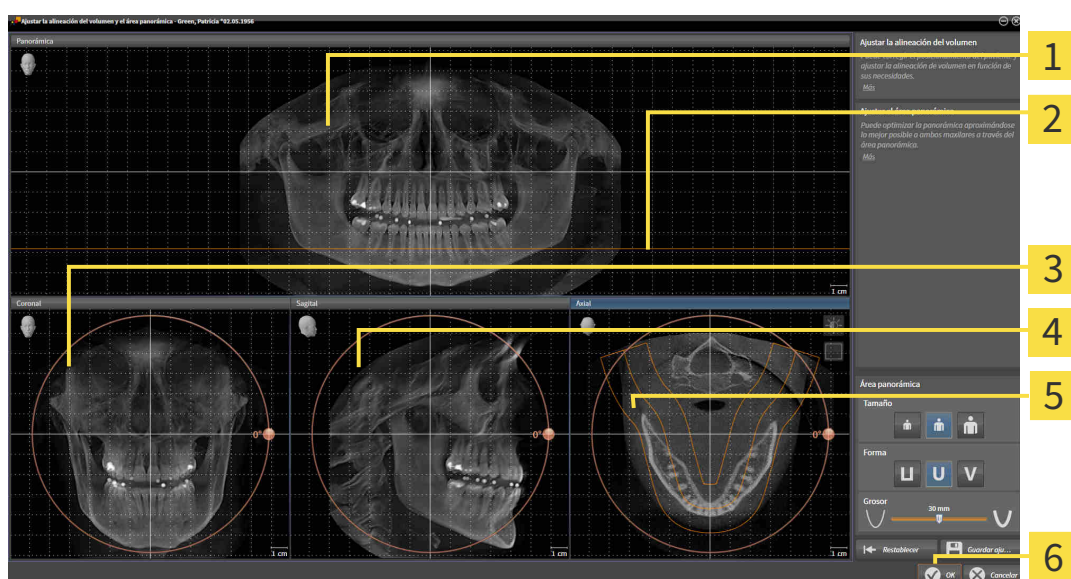

1 Panorámica Vista

2 Línea de referencia axial

3 Coronal Vista con regulador de **Giro**

4 Sagittal Vista con regulador de **Giro**

5 Axial Vista con regulador de **Giro**

6 Botón **OK**

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA CORONAL

1. Active la vista **Coronal**:




- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de corte o símbolo Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Giro Regulador de | |

2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Coronal**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA SAGITAL

1. Active la vista **Sagital**:

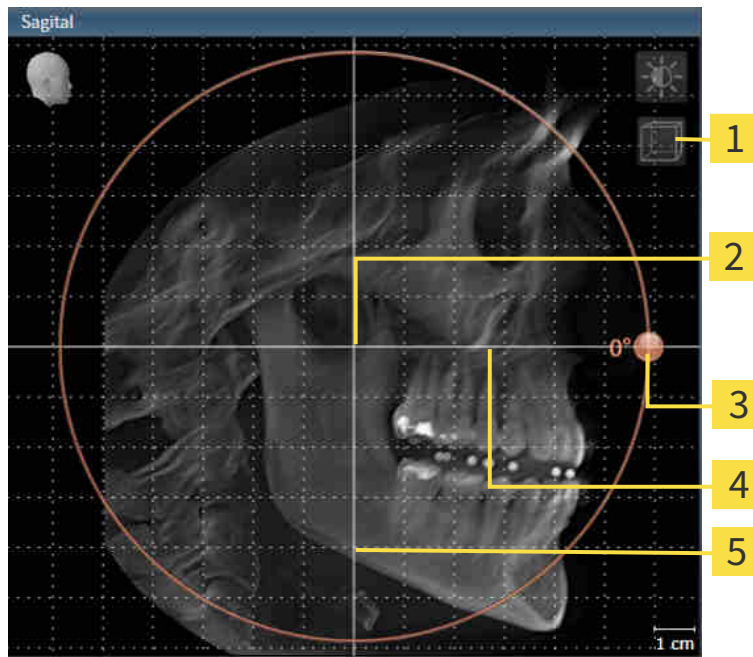


- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de corte o símbolo Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Giro Regulador de | |

2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Sagital**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. Active la vista **Axial**:

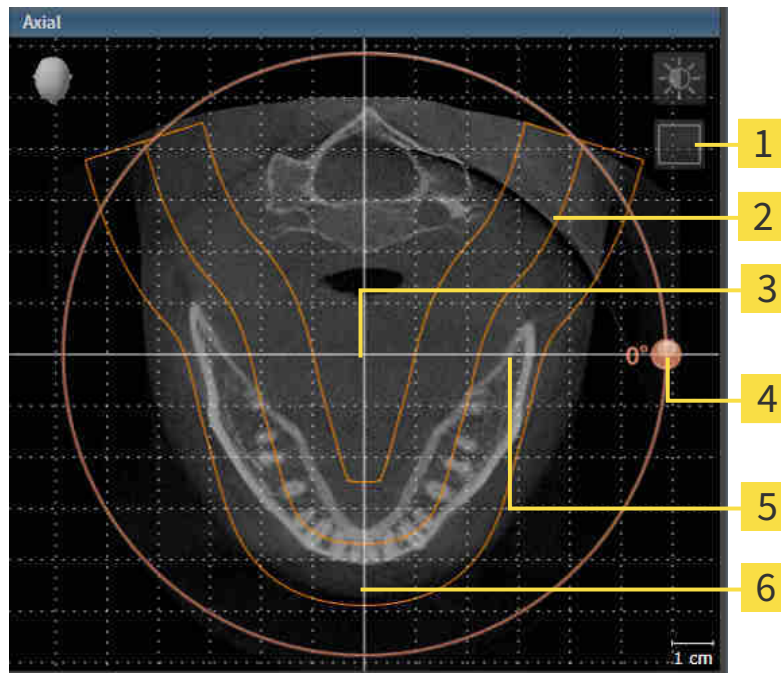

- | | |
|---|---|
| 1 Símbolo Activar el modo de proyección o símbolo Activar el modo de corte | 4 Giro Regulador de |
| 2 Área panorámica | 5 Línea de referencia horizontal |
| 3 Centro de rotación | 6 Línea de referencia vertical |

2. Asegúrese de que el modo de cortes está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
3. Desplácese hasta un corte con las raíces de los dientes de la mandíbula, por ejemplo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la línea de referencia axial en la vista panorámica y moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo sin soltar el botón.
4. En caso necesario, desplace el área panorámica en la vista **Axial** haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el área panorámica y moviendo el ratón sin soltar el botón izquierdo. SICAT Endo desplaza el centro de rotación, la línea de referencia horizontal y la línea de referencia vertical.
5. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
8. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia el área panorámica, la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.
9. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.

- ▶ Si el ajuste de la alineación del volumen tiene efectos en objetos existentes en aplicaciones SICAT, SICAT Endo abre una ventana de notificación que informa sobre los efectos concretos.
10. Si a pesar de ello desea ajustar la alineación del volumen, haga clic en el botón **Ajustar** de la ventana de notificación.
- ▶ SICAT Endo guarda la alineación de volumen ajustada y muestra el volumen alineado de la manera que corresponda en todas las vistas.



Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 113 - Standalone*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Endo sincroniza el zoom entre las vistas, exceptuando la vista **Axial**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica, puede hacer clic en el botón **Restablecer**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.

27.2 AJUSTAR EL ÁREA PANORÁMICA

Encontrará información general sobre el área panorámica en *Alineación de volumen y área panorámica* [[Página 132 - Standalone](#)].

El ajuste del área panorámica consta de los siguientes pasos:

- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Ajustar la posición de los cortes de la vista **Axial**
- Desplazar el área panorámica
- Girar el volumen en la vista **Axial**
- **Tamaño**Ajustar , **Forma** y **Grosor** del área panorámica


ABRIR LA VENTANA AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.

- ▶ Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

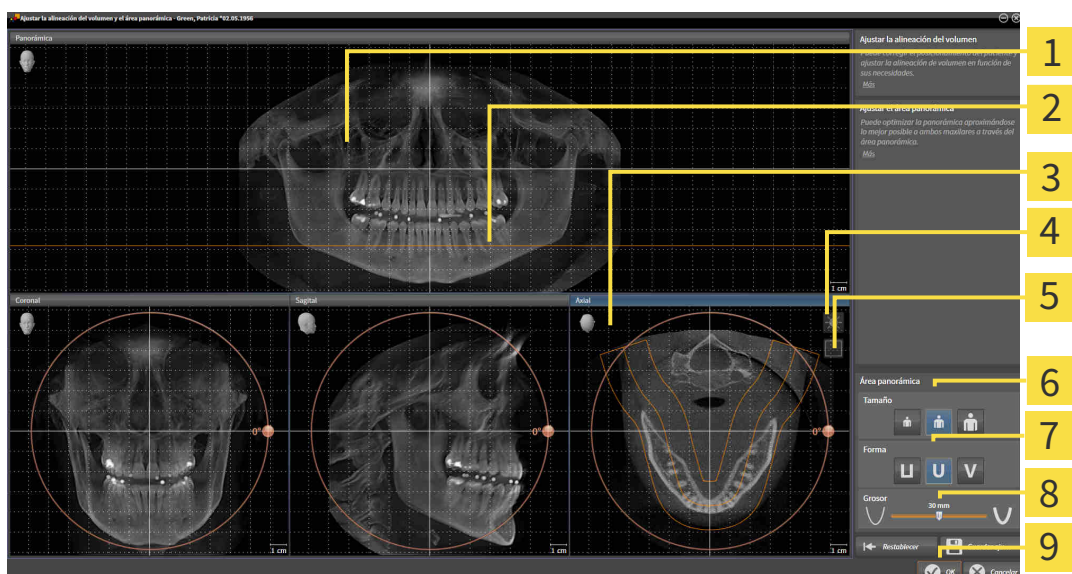

1 Panorámica Vista

2 Línea de referencia axial

3 Axial Vista con regulador de Giro

4 Símbolo **Ajustar brillo y contraste**

5 Símbolo **Activar el modo de proyección** o símbolo **Activar el modo de corte**

6 Tamaño Botones

7 Forma Botones

8 Grosor Corredera

9 Botón **OK**

AJUSTAR LA POSICIÓN DE LOS CORTES DE LA VISTA AXIAL



1. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de cortes. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
2. En la vista **Panorámica**, sitúe el puntero del ratón sobre la línea de referencia axial. La línea de referencia axial muestra la posición actual de los cortes de la vista **Axial**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ El corte de la vista **Axial** se ajusta conforme a la posición de la línea de referencia axial en la vista **Panorámica**.
5. Cuando la línea de referencia axial se encuentre en las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ La vista **Axial** mantiene el corte actual.

DESPLAZAR EL ÁREA PANORÁMICA

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el área panorámica.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo desplaza el área panorámica según la posición del puntero del ratón.
4. Cuando la curva central del área panorámica siga a las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El área panorámica mantiene su posición actual.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - ▶ SICAT Endo gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
4. Cuando las raíces de los dientes de la mandíbula sigan a la curva central del área panorámica, suelte el botón izquierdo del ratón.

AJUSTAR TAMAÑO, FORMA Y GROSOR DEL ÁREA PANORÁMICA



1. Seleccione la **Tamaño** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Tamaño** correspondiente.



2. Seleccione la **Forma** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Forma** correspondiente.



3. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de proyección. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.



4. Seleccione el **Grosor** del área panorámica desplazando la corredera **Grosor**. Asegúrese de que el área panorámica contenga por completo todos los dientes y los dos maxilares. Mantenga un grosor lo más bajo posible.

5. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.

- SICAT Endo guarda la alineación de volumen ajustada y el área panorámica ajustada y muestra la vista **Panorámica** correspondiente.

Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:



- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [► *Página 113 - Standalone*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Endo sincroniza el zoom entre las vistas, exceptuando la vista **Axial**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica, puede hacer clic en el botón **Restablecer**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.

28 IMPRESIONES ÓPTICAS



Solo puede importar y registrar impresiones ópticas de datos radiográficos que se hayan generado con equipos de rayos X 3D de Sirona.

SICAT Endo puede mostrar simultáneamente datos radiográficos e impresiones ópticas concordantes del mismo paciente. La visualización combinada ofrece información adicional para el análisis y el diagnóstico. Además, la implementación de la terapia se basa en las impresiones ópticas.

Para utilizar datos con impresiones ópticas en SICAT Endo son necesarias las siguientes acciones:

- Registro de impresiones ópticas en datos radiográficos.

SICAT Endo admite los siguientes formatos de archivo para impresiones ópticas:

- Archivos SIXD que contengan una impresión óptica del maxilar y una impresión óptica de la mandíbula
- Archivos SSI que contengan una impresión óptica del maxilar y una impresión óptica de la mandíbula
- Archivos STL que contengan una impresión óptica del maxilar o una impresión óptica de la mandíbula (se requiere licencia de **SICAT Suite STL Import**)

Las siguientes herramientas están disponibles para las impresiones ópticas:

- *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 143 - Standalone*]
- *Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT* [▶ *Página 150 - Standalone*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas*: encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*].
- *Enfocar impresiones ópticas y eliminar impresiones ópticas*: encontrará más información al respecto en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 95 - Standalone*].

Las impresiones ópticas en formato STL requieren pasos adicionales al importar. Encontrará información sobre ello en *Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL* [▶ *Página 149 - Standalone*].

28.1 IMPORTAR Y REGISTRAR IMPRESIONES ÓPTICAS



PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.



PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.



PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.



PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.



PRECAUCIÓN

Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.



PRECAUCIÓN

La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.



Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.



Puede utilizar la **Ventana explor** para comprobar si una impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos. Puede desplazar la **Ventana explor** y desplazarse por los cortes en la **Ventana explor**.

Encontrará información general sobre las impresiones ópticas en *Impresiones ópticas* [► *Página 142 - Standalone*].


Para importar y registrar una impresión óptica, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**.
3. En la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**, vaya al archivo con una impresión óptica que desee, selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
 - La ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas** se cierra.

► SICAT Endo abre el archivo con la impresión óptica seleccionado:

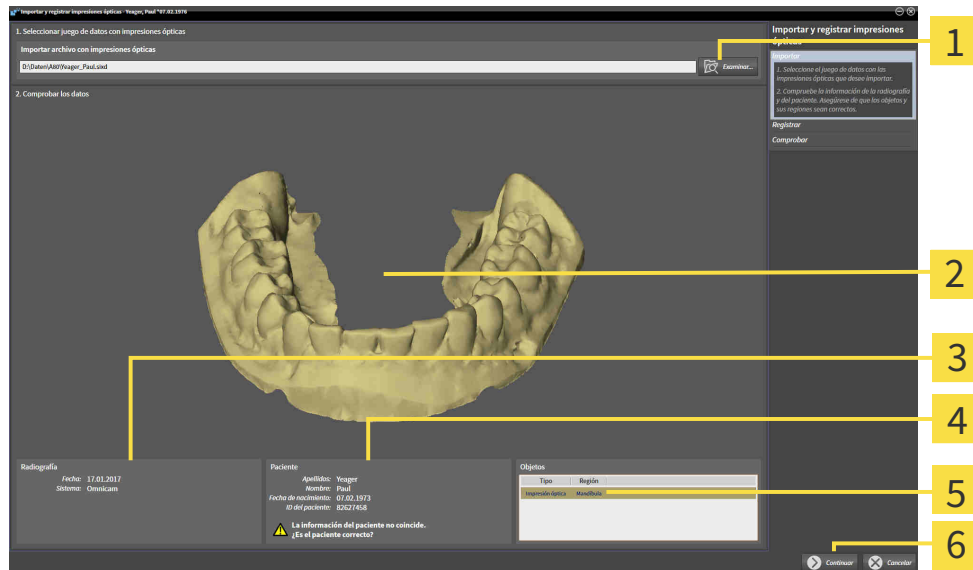

1 Área **Importar archivo con impresiones ópticas**

2 **3D**Vista de la impresión óptica

3 Información de la radiografía


4 Información del paciente

5 Lista de objetos

6 Botón **Continuar**


4. Compruebe la información de la radiografía y la información del paciente.
5. Asegúrese de que los objetos y sus regiones sean correctos. El color de fondo de la lista de objetos se corresponde con el color de los objetos de la vista **3D**.
6. Haga clic en **Continuar**.

- ▶ Si los datos de los pacientes son diferentes en la radiografía 3D y en la impresión óptica, SICAT Endo abre la ventana **Información del paciente diferente**:

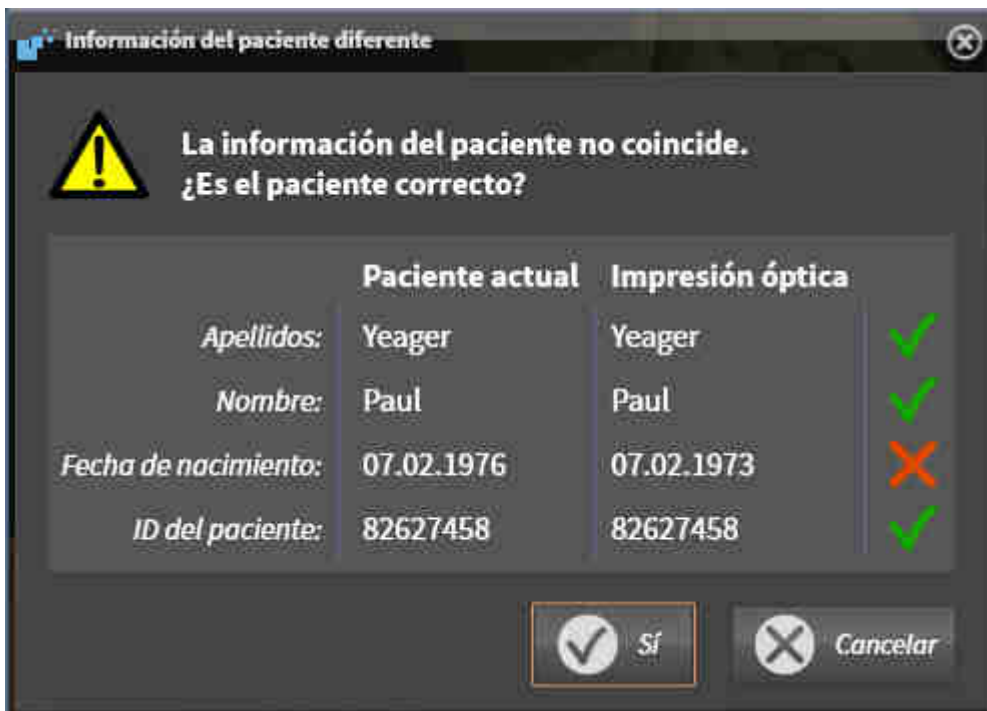


- 7. Compare los datos de los pacientes. Si está seguro de que la impresión óptica coincide con el paciente actual, haga clic en el botón **Sí**.

- ▶ El paso **Registrar** se abre:

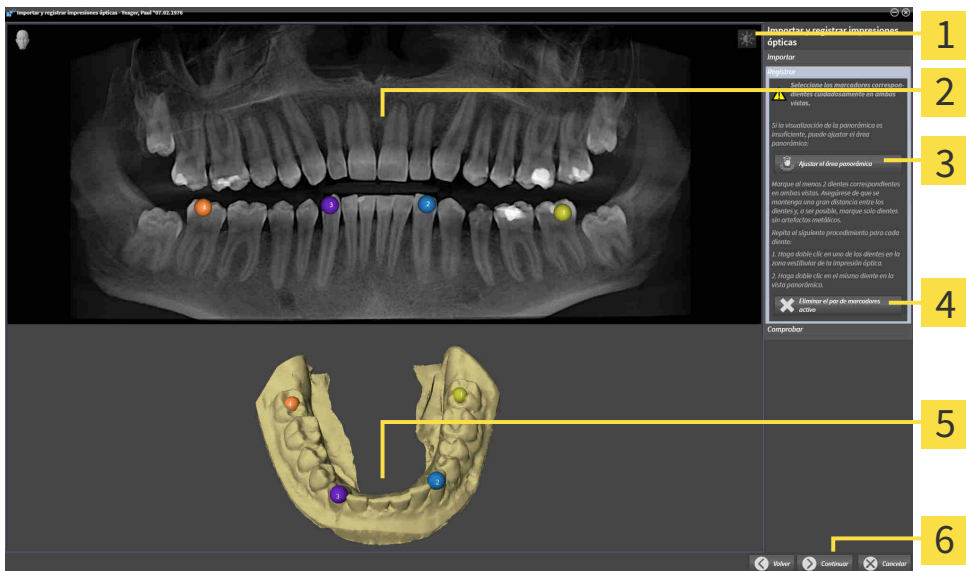

- | | |
|--|--|
| 1 Símbolo Ajustar brillo y contraste | 4 Botón Eliminar el par de marcadores activo |
| 2 Panorámica Vista | 5 3D Vista que muestra la impresión óptica |
| 3 Botón Ajustar el área panorámica | 6 Botón Continuar |

8. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el mismo diente para la impresión óptica tanto en la vista **Panorámica** como en la cara vestibular de la impresión óptica en la vista **3D**. Asegúrese de que se mantenga una gran distancia entre los dientes y marque solo dientes sin artefactos metálicos. Repita este paso hasta que se hayan identificado al menos dos dientes coincidentes en ambas vistas.
 - ▶ Las marcas con distintos colores y números en ambas vistas indican los dientes asignados en la impresión óptica.
9. Haga clic en **Continuar**.
 - ▶ SICAT Endo calcula el registro de la impresión óptica con los datos radiográficos.
 - ▶ El paso **Comprobar** se abre:

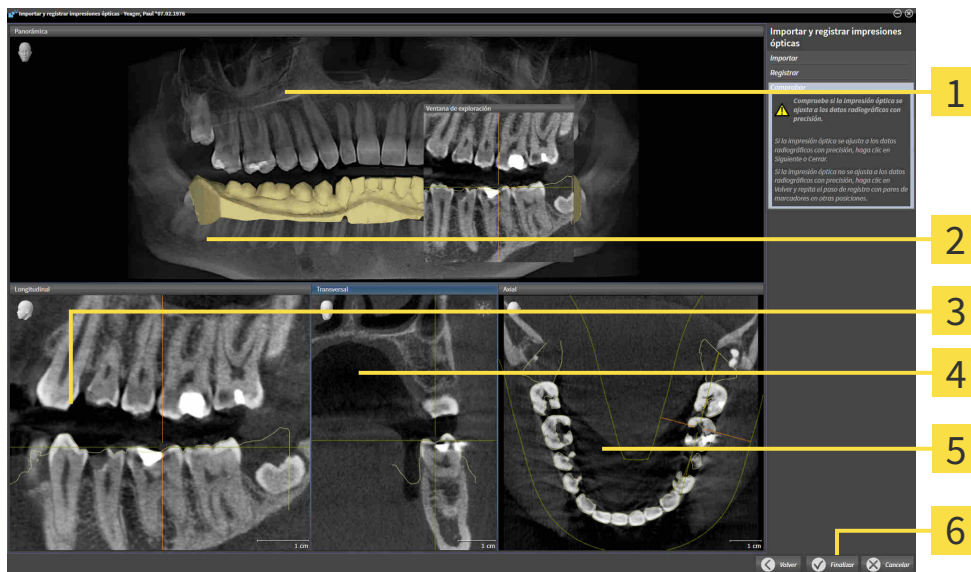

- | | |
|--|---|
| <p>1 Panorámica Vista</p> <p>2 Ventana explor</p> <p>3 Longitudinal Vista</p> | <p>4 Transversal Vista</p> <p>5 Axial Vista</p> <p>6 Botón Finalizar</p> |
|--|---|

10. En las vistas de corte 2D, compruebe si la impresión óptica se ajusta a los datos radiográficos con precisión. Desplácese por los cortes y compruebe los contornos mostrados.
11. Si la impresión óptica no se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Volver** y repita el paso **Registrar** con los pares de marcadores en otras posiciones.
12. Si la impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ SICAT Endo añade la impresión óptica seleccionada al **Navegador de objetos**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la impresión óptica registrada.



Además del procedimiento descrito, en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 113 - Standalone*].
- Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 139 - Standalone*].
- Si desea eliminar un par de marcadores determinado en el paso **Registrar**, seleccione uno de los marcadores del par y haga clic en el botón **Eliminar el par de marcadores activo**.
- Si desea cancelar la importación y el registro de impresiones ópticas, haga clic en **Cancelar**.

28.2 PASOS ADICIONALES PARA LAS IMPRESIONES ÓPTICAS EN FORMATO STL

Los archivos STL no contienen información sobre la posición y la orientación de las impresiones ópticas. Por ello, debe adaptar la posición y la orientación en caso necesario:

Ha activado ya una licencia **SICAT Suite STL Import**.

1. Abra las impresiones ópticas desde un archivo en formato STL. Encontrará información sobre ello en Importar y registrar impresiones ópticas.

► Se abre la ventana **STL Import-Assistent**:



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Selección del maxilar | 3 Cambio del lado interno y el externo |
| 2 Cambio de orientación | 4 Botón OK |

2. En el área **Maxilar**, seleccione si la impresión óptica contiene el **maxilar** o la **mandíbula** haciendo clic en el símbolo correspondiente.



3. Si es necesario, modifique la orientación de las impresiones ópticas para un posicionamiento previo aproximado haciendo clic en los símbolos de las flechas o los símbolos de rotación en el área **Orientación**.
4. Si es necesario, cambie el lado interno y externo de las impresiones ópticas haciendo clic en la representación de las impresiones ópticas en el área **Parámetros**.
5. Haga clic en el botón **OK**.
6. Si es necesario, repita los pasos para un segundo archivo STL. SICAT Endo asigna automáticamente el segundo archivo STL al otro maxilar.
 - SICAT Endo muestra las impresiones ópticas importadas en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
7. Continúe registrando las impresiones ópticas. Encontrará información sobre ello en Importar y registrar impresiones ópticas.

28.3 REUTILIZAR IMPRESIONES ÓPTICAS PROCEDENTES DE OTRAS APLICACIONES SICAT


PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.


PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.


PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.


PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.


PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.


PRECAUCIÓN

Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.




Encontrará información general sobre las impresiones ópticas en *Impresiones ópticas* [► *Página 142 - Standalone*].

Para reutilizar impresiones ópticas procedentes de otra aplicación SICAT, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.

- ☑ Tiene un estudio abierto en otra aplicación SICAT y ya ha importado a él impresiones ópticas que todavía no está utilizando en SICAT Endo.
 - 1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
 - 2. En el área **Reutilizar impresiones ópticas procedentes de otras aplicaciones SICAT**, haga clic en la línea donde estén las impresiones ópticas que desee.
 - 3. SICAT Endo muestra las impresiones ópticas seleccionadas:
 - 4. Compruebe la información de la radiografía y la información del paciente. Asegúrese de que los objetos y sus regiones sean correctos. El color de fondo de la lista de objetos se corresponde con el color de los objetos de la vista **3D**.
 - 5. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - ▶ SICAT Endo añade las impresiones ópticas seleccionadas al **Navegador de objetos**.
 - ▶ SICAT Endo muestra las impresiones ópticas seleccionadas:
- Si desea cancelar la importación de impresiones ópticas de otra aplicación SICAT, haga clic en **Cancelar**.

29 RADIOGRAFÍAS INTRAORALES

 PRECAUCIÓN	<p>Los dispositivos para radiografías intraorales no aprobados como productos médicos podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.</p> <p>Asegúrese de utilizar para las radiografías intraorales únicamente dispositivos aprobados como productos médicos.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>La integridad o calidad insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.</p> <p>Compruebe la integridad y la calidad de las radiografías intraorales importadas.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>Las radiografías intraorales que no se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.</p> <p>Compruebe que las radiografías intraorales se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>Las radiografías intraorales que no coincidan con el paciente ni con la radiografía 3D o cuyo momento de adquisición diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.</p> <p>Asegúrese de que, en una radiografía intraoral, coincidan el paciente y la radiografía 3D, y de que el momento de adquisición no diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>Una calidad insuficiente de las radiografías intraorales o las radiografías 3D podrían conllevar que el mecanismo de registro de las radiografías intraorales fallara.</p> <p>Utilice únicamente radiografías intraorales y radiografías 3D que permitan un registro correcto.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>La calidad y la precisión insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.</p> <p>Utilice únicamente radiografías intraorales que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.</p>
 PRECAUCIÓN	<p>Una posición u orientación incorrecta de las radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.</p> <p>Después del registro, compruebe la correcta posición y orientación de las radiografías intraorales con los dientes en la radiografía 3D.</p>


PRECAUCIÓN

Una orientación incorrecta de las radiografías intraorales en relación con las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Compruebe que las radiografías intraorales registradas estén correctamente adaptadas a la radiografía 3D.
2. En caso necesario, gire las radiografías intraorales para orientarlas correctamente.


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta de los números de dientes podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que coincidan los números de dientes seleccionados y los números de dientes anatómicos reales.

Puede utilizar radiografías intraorales en SICAT Endo para preparar el diagnóstico y planificar el tratamiento. Las radiografías intraorales pueden importarse y administrarse en la ventana **Radiograph Manager**.

Para utilizar radiografías intraorales en SICAT Endo son necesarias las siguientes acciones:

- Importación de archivos DICOM que contengan radiografías intraorales
- Asignación de números de dientes a las radiografías intraorales
- Registro de las radiografías intraorales

SICAT Endo compatible con el siguiente formato de archivos para las radiografías intraorales:

- Datos DICOM presentes como archivos Single-Frame

Encontrará una lista de sistemas de adquisición compatibles en *Sensores de radiografías intraorales compatibles* [► *Página 154 - Standalone*].

Para las radiografías intraorales están disponibles las siguientes acciones:

- *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [► *Página 155 - Standalone*]
- *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [► *Página 159 - Standalone*]
- *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 161 - Standalone*]

29.1 SENSORES DE RADIOGRAFÍAS INTRAORALES COMPATIBLES

SICAT Endo compatible con los siguientes sensores de radiografías intraorales:

- XIOS XG Supreme, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- XIOS XG Select, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- XIOS Plus, fabricante: Sirona Dental Systems GmbH, Alemania
- Schick 33, fabricante: Sirona Dental Inc., EE. UU.
- Schick Elite, fabricante: Sirona Dental Inc., EE. UU.

29.2 IMPORTAR RADIOGRAFÍAS INTRAORALES Y ASIGNAR DIENTES

Encontrará información general sobre las radiografías intraorales en *Radiografías intraorales* [► *Página 152 - Standalone*].


Para importar radiografías intraorales y asignar uno o más dientes, proceda de la siguiente manera:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 89 - Standalone*].
- ☑ La radiografía intraoral aún no está en SICAT Endo. Puede importar cada radiografía intraoral tan solo una vez.
- ☑ La radiografía intraoral está disponible como archivo DICOM en formato Single-Frame.
- ☑ La radiografía intraoral ha sido creada con un dispositivo de radiografías intraorales compatible. Encontrará información sobre ello en *Sensores de radiografías intraorales compatibles* [► *Página 154 - Standalone*].



1. Haga clic en el símbolo **Administrando y registrando radiografías intraorales**.
 - Se abre la ventana **Radiograph Manager**.
2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Abrir radiografía intraoral**.
3. En la ventana **Abrir radiografía intraoral**, pase al archivo deseado con radiografías intraorales y seleccione como mínimo un archivo. Puede importar varias radiografías a la vez manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** y seleccionando sucesivamente varios archivos.
4. Haga clic en **Abrir**.
 - La ventana **Abrir radiografía intraoral** se cierra.

► SICAT Endo muestra las radiografías intraorales importadas:

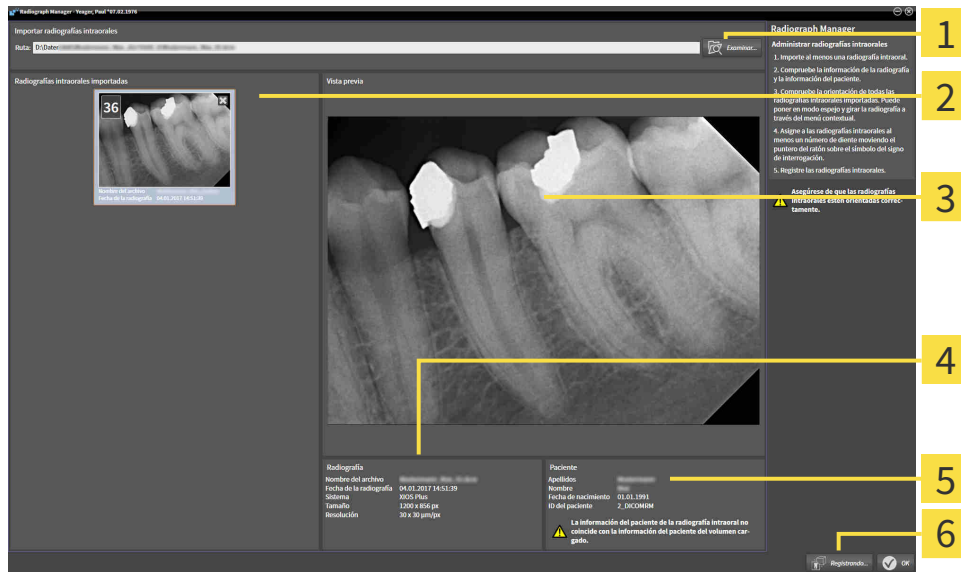

- 1** Botón **Examinar**
- 2** Área **Radiografías intraorales importadas**
- 3** Área **Vista previa**
- 4** Información del paciente
- 5** Información de la radiografía
- 6** Botón **Registrando**

5. Para seleccionar una radiografía intraoral importada, haga clic en una radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas**.

► SICAT Endo muestra la radiografía seleccionada en el área **Vista previa**.

6. Compruebe la información sobre el paciente y la información sobre la radiografía. Asegúrese de que la radiografía y el paciente coincidan y de que los datos de la radiografía 3D y la radiografía intraoral no disten en más de 90 días.

7. Asegúrese de que la radiografía intraoral importada tenga la orientación anatómica correcta.

8. Si una radiografía intraoral importada no tiene la orientación anatómica correcta, haga clic con el ratón derecho en la radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas** y, en el menú contextual, seleccione una de las entradas **Modo espejo horizontal**, **Modo espejo vertical**, **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj** o **Girar en el sentido de las agujas del reloj**.


► SICAT Endo refleja la radiografía en el eje horizontal o vertical de la imagen.

► SICAT Endo gira la radiografía en pasos de 90 grados a la izquierda o a la derecha.



9. Mueva el puntero del ratón por el símbolo de interrogación en una radiografía.

- Se abre la ventana **Número de diente**:

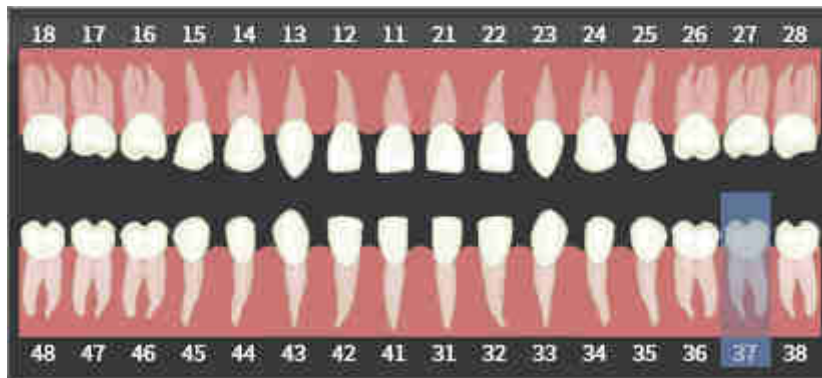

10. Asigne hasta cuatro números de dientes a la radiografía haciendo clic sucesivamente en los números de dientes anatómicamente correctos.
 11. Para cerrar la ventana **Número de diente**, posicione el puntero del ratón fuera de la ventana.
- SICAT Endo cierra la ventana **Número de diente**.
 - SICAT Endo muestra los números de dientes asignados en las radiografías intraorales.
 - SICAT Endo guarda los cambios realizados al salir del Radiograph Manager.

En el área **Radiografías intraorales importadas** puede activar las siguientes funciones a través del menú contextual:



- **Modo espejo horizontal**
- **Modo espejo vertical**
- **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj**
- **Girar en el sentido de las agujas del reloj**
- **Número de diente**
- **Registrando**
- **Eliminar**

Para eliminar radiografías intraorales importadas del área **Radiografías intraorales importadas**, tiene las siguientes posibilidades:



- Haga clic en el símbolo **Eliminar radiografía intraoral del proyecto de planificación** en una radiografía.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en una radiografía y seleccione en el menú contextual la entrada **Eliminar**.
- Marque una radiografía en el área **Radiografías intraorales importadas** y pulse la tecla **Supr**.

Para registrar una radiografía intraoral importada, continúe con la siguiente sección:

- *Asistente de registro* [► *Página 158 - Standalone*]

30 ASISTENTE DE REGISTRO

El asistente de registro le proporciona funciones para registrar radiografías intraorales.

Para poder utilizar el asistente de registro, deberá tener las radiografías intraorales importadas y con números de dientes asignados. Encontrará información sobre ello en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 155 - Standalone*].

Antes de comenzar el trabajo con el asistente de registro, deberá seleccionar la radiografía intraoral que desee registrar.

En el asistente de registro puede llevar a cabo una orientación previa de la radiografía intraoral en la curva panorámica. Con la vista **Proyección en 3D** puede seguir refinando la orientación antes de que SICAT Endo registre la radiografía intraoral automáticamente.

El asistente de registro comprende los siguientes pasos:

- *Posicionar previamente la radiografía intraoral* [▶ *Página 159 - Standalone*]
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 161 - Standalone*]

Si no es suficiente el posicionamiento previo en la vista **Panorámica**, en el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede adaptar la orientación también a través de la vista **Transversal** o la vista **Axial**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial* [▶ *Página 164 - Standalone*].

Si una radiografía intraoral contiene áreas que podrían causar problemas en el registro, en el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede poner una máscara de color a estas áreas y excluirlas del registro. Encontrará información sobre ello en *Poner máscaras en áreas* [▶ *Página 167 - Standalone*].

30.1 POSICIONAR PREVIAMENTE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

Encontrará información general sobre el asistente de registro en *Asistente de registro* [► *Página 158 - Standalone*].

En el paso **Posicionar previamente la radiografía intraoral** puede orientar la radiografía intraoral a la curva panorámica de tal manera que se dé la mejor cobertura posible entre la radiografía 3D y la radiografía intraoral.

- ✓ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 89 - Standalone*].
- ✓ Ha importado al menos una radiografía intraoral y ha asignado al menos un número de diente a la radiografía intraoral. Encontrará información sobre ello en *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [► *Página 155 - Standalone*].

1. Haga clic en el símbolo **Administrando y registrando radiografías intraorales**.
 - Se abre la ventana **Radiograph Manager**.
2. Para seleccionar una radiografía intraoral para el registro, haga clic en ella con el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo marca la radiografía.
3. Haga clic en el botón **Registrando**.
 - El paso **Posicionar previamente la radiografía intraoral** se abre:



1 Ventana **Panorámica**

3 Botón **Continuar**

2 El regulador de **transparencia**

- SICAT Endo muestra en la ventana **Panorámica** la radiografía intraoral en la curva panorámica.
4. Para desplazar la radiografía intraoral, posicione el puntero del ratón en la radiografía.
 5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 6. Desplace la radiografía intraoral a la posición deseada.
 7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene la posición actual de la radiografía intraoral.

8. En caso necesario, puede adaptar la orientación de la radiografía intraoral en el área **Posicionar previamente la radiografía intraoral** a través de los botones **Modo espejo horizontal**, **Modo espejo vertical**, **Girar en el sentido de las agujas del reloj** o **Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj**.
9. Para acceder al siguiente paso del registro, haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Registrar la radiografía intraoral** se abre.

Para iniciar el registro de una radiografía intraoral, de manera alternativa puede proceder de la siguiente manera:



- Haga doble clic en la radiografía intraoral en el área **Radiografías intraorales importadas**.
- Marque la radiografía intraoral en el área **Radiografías intraorales importadas** y pulse la **tecla Intro**.
- En el área **Radiografías intraorales importadas**, haga clic en la radiografía intraoral con el botón derecho del ratón y seleccione en el menú contextual la entrada **Registrando**.




Para comprobar la correcta cobertura entre la radiografía intraoral y la vista panorámica, puede adaptar la transparencia con el regulador de **transparencia**.

Continúe con *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 161 - Standalone*].

30.2 REGISTRAR LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

Encontrará información general sobre el asistente de registro en *Asistente de registro* [► *Página 158 - Standalone*].

En el paso **Registrar la radiografía intraoral** puede llevar a cabo un ajuste preciso de la posición inicial de la radiografía intraoral antes de llevar a cabo el registro automático.

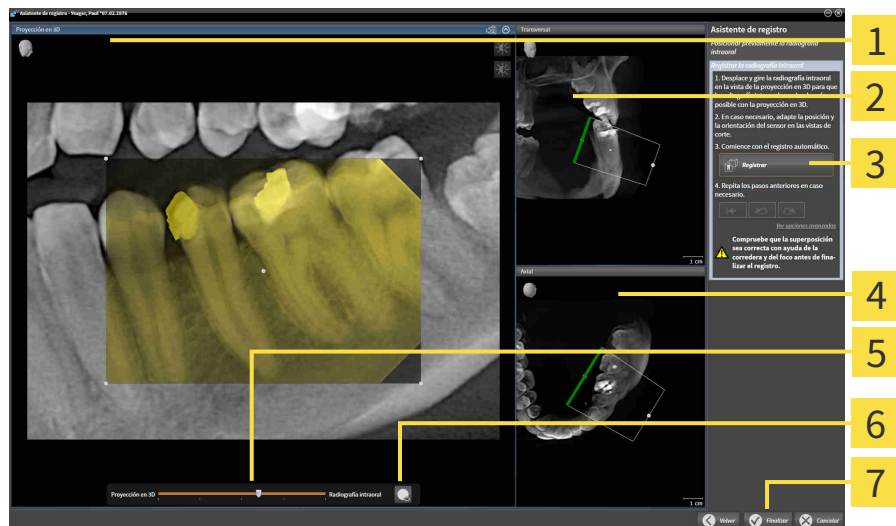

1 Proyección en 3D Vista

2 Transversal Vista

3 Botón **Registrar**

4 Axial Vista

5 El regulador de **transparencia**

6 Botón **Foco**

7 Botón **Finalizar**

Para adaptar la cobertura de la radiografía intraoral con la vista **Proyección en 3D**, haga lo siguiente:



1. En la vista **Proyección en 3D**, sitúe el puntero del ratón sobre la radiografía intraoral.
 - El puntero del ratón se transforma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la radiografía intraoral a la posición deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene el giro actual de la radiografía intraoral.
 - SICAT Endo adapta la vista **Transversal** y la vista **Axial** en correspondencia.



5. Para girar la radiografía intraoral, posicione el puntero del ratón en la vista **Proyección en 3D** sobre uno de los puntos de control en las esquinas de la radiografía.
 - El puntero del ratón se transforma.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
7. Gire la radiografía intraoral en la dirección deseada.

8. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la radiografía intraoral.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal** y la vista **Axial** en correspondencia.

ENCENDER Y APAGAR EL FOCO

Para comprobar la correcta cobertura de la radiografía intraoral con la proyección en 3D, en la vista **Proyección en 3D** puede aplicar un foco.



1. Haga clic en el botón **Foco**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la radiografía intraoral.
 - ▶ SICAT Endo muestra un foco.
3. Desplace el puntero del ratón al punto que desee comprobar de la radiografía intraoral.
4. Repita este paso para todos los puntos que desee comprobar.
5. Para volver a ocultar el foco, haga clic de nuevo en el botón **Foco**.
 - ▶ SICAT Endo oculta el foco.



ADAPTAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL O AXIAL

En caso de que no baste la orientación de la radiografía intraoral en la vista **Proyección en 3D**, puede orientar la adaptación también en la vista **Transversal** o en la vista **Axial**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la orientación previa en la vista transversal y axial* [▶ *Página 164 - Standalone*].

PONER MÁSCARAS EN LAS ÁREAS DE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL

En caso de que desee descartar áreas determinadas de la radiografía intraoral del registro automático, puede poner una máscara de color a estas áreas. SICAT Endo no tiene en cuenta estas áreas con máscara en el registro automático. Encontrará información sobre ello en *Poner máscaras en áreas* [▶ *Página 167 - Standalone*].

REALIZAR REGISTRO AUTOMÁTICO

- Para llevar a cabo el registro automático, en el área **Registrar la radiografía intraoral** haga clic en el botón **Registrar**.
 - ▶ SICAT Endo lleva a cabo el registro de la radiografía intraoral con la radiografía 3D.
 - ▶ SICAT Endo cierra el asistente de registro.
 - ▶ SICAT Endo muestra el resultado del registro en la ventana **Radiograph Manager**.

COMPROBAR REGISTRO

1. Compruebe el resultado del registro con ayuda de la vista **Proyección en 3D**, la vista **Transversal** y la vista **Axial**.
2. Si no está satisfecho con el resultado, puede adaptar la posición de la radiografía intraoral desplazando la radiografía intraoral con el ratón mediante «arrastrar y soltar».
3. Para terminar el registro, haga clic en el botón **Finalizar**.

▶ El **Asistente de registro** se cierra.

▶ Se abre la ventana **Radiograph Manager**.



▶ SICAT Endo muestra la radiografía intraoral como registrada en el área **Radiografías intraorales importadas** del **Radiograph Manager**.



Para comprobar la correcta cobertura entre la radiografía intraoral y la vista panorámica, puede adaptar la transparencia con el regulador de **transparencia**.



Para restablecer la última adaptación realizada, haga clic en el botón **Deshacer último paso**. Para restablecer todas las adaptaciones realizadas, haga clic en el botón **Deshacer todos los pasos**.


30.3 ADAPTAR LA ORIENTACIÓN PREVIA EN LA VISTA TRANSVERSAL Y AXIAL

Encontrará información general sobre la adaptación de la superposición de la radiografía intraoral con la proyección en 3D en *Registrar la radiografía intraoral* [► *Página 161 - Standalone*].

Incluso si puede orientar la radiografía intraoral de forma anatómicamente correcta en la vista **Proyección en 3D**, en determinadas radiografías SICAT Endo no podría ser capaz de realizar el registro automático de la radiografía intraoral con la radiografía 3D.

Adapte en este caso el posicionamiento de la radiografía intraoral en la vista **Transversal** o en la vista **Axial**:

DESPLAZAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL

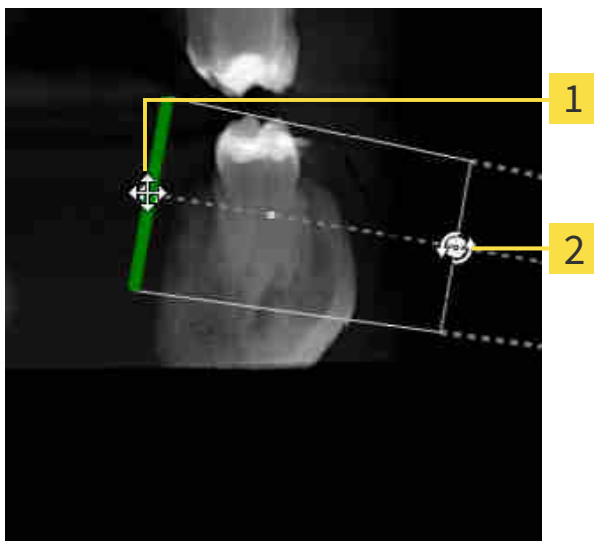

1 Punto de control **Uno**


2 Punto de control **Dos**

1. Para desplazar la orientación del aparato de rayos X y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Uno**.
 - El puntero del ratón se visualiza como una cruz con cuatro flechas.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Axial** en correspondencia.

GIRAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA TRANSVERSAL

1. Para girar la orientación del aparato de rayos C y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Dos**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un círculo con dos flechas girándose.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Gire la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Axial** en correspondencia.

DESPLAZAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA AXIAL

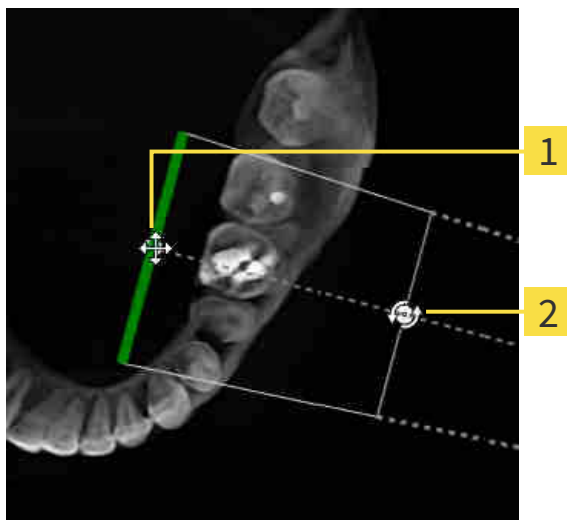

1 Punto de control **Uno**

2 Punto de control **Dos**

1. Para desplazar la orientación del aparato de rayos X y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal** sobre el punto de control **Uno**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz con cuatro flechas.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Transversal** en correspondencia.

GIRAR LA ORIENTACIÓN EN LA VISTA AXIAL

1. Para girar la orientación del aparato de rayos C y del sensor en la radiografía 3D, sitúe el puntero del ratón en la vista **Axial** sobre el punto de control **Dos**.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un círculo con dos flechas girándose.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Gire la orientación en la dirección deseada.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la orientación actual.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Proyección en 3D** y la vista **Transversal** en correspondencia.

30.4 PONER MÁSCARAS EN ÁREAS

Una radiografía intraoral puede contener áreas que podrían causar problemas en el registro automático. Por ejemplo:

- Artefactos metálicos
- Dientes del maxilar opuesto
- Bordes de la radiografía intraoral que no pertenecen a la radiografía


Para evitar problemas en el registro automático, puede poner máscaras en estas áreas. SICAT Endo excluye todas las áreas con máscara del registro automático.

Para poner máscaras en áreas concretas de una radiografía intraoral, proceda de la siguiente manera:

1. Haga clic en el botón **Ver opciones avanzadas** del área **Registrar la radiografía intraoral**.
▶ SICAT Endo muestra el botón **Editar máscara**.



2. Haga clic en el botón **Editar máscara**.
▶ SICAT Endo muestra la barra de herramientas de las máscaras en el borde derecho de la radiografía intraoral:

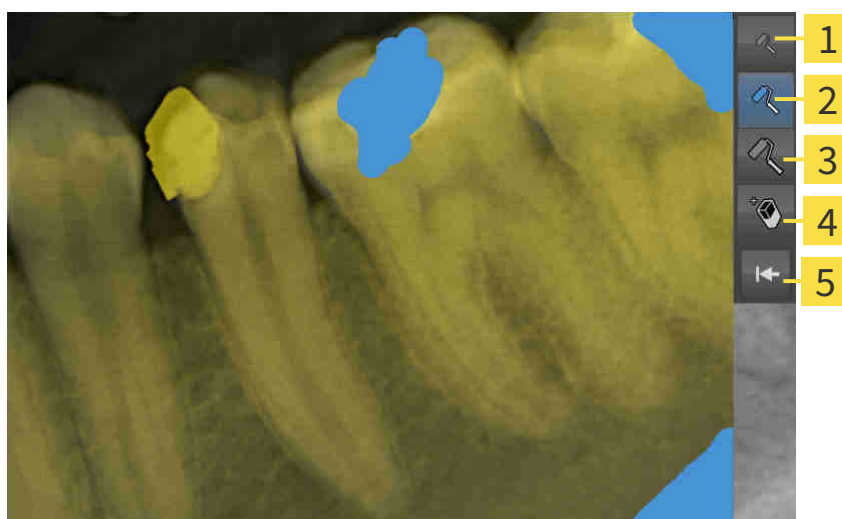

1 Botón **Utilizar el pincel pequeño**

4 Botón **Utilizar goma**

2 Botón **Utilizar el pincel mediano**

5 Botón **Restablecer máscara**

3 Botón **Utilizar el pincel grande**

3. Para colorear un área, haga clic en el botón **Utilizar el pincel pequeño**, el botón **Utilizar el pincel mediano** o el botón **Utilizar el pincel grande**.
▶ El puntero del ratón se transforma en un círculo.
4. Sitúe el puntero del ratón en el área que desee colorear de la radiografía intraoral.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
6. Mueva el puntero del ratón por el área que desee colorear.

7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el área marcada de color azul.
8. Repita los pasos en caso necesario para poner máscaras en otras áreas de la radiografía intraoral.
9. Para eliminar un área marcada de azul, haga clic en el botón **Utilizar goma**.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma en una goma.
10. Haga clic en el área marcada en azul que desee eliminar con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo elimina el área marcada de la radiografía intraoral.
11. Para eliminar todas las marcas realizadas, haga clic en el botón **Restablecer máscara**.
 - ▶ SICAT Endo elimina todas las áreas marcadas de azul de la radiografía intraoral.
12. En el área **Registrar la radiografía intraoral**, haga clic en el botón **Finalizar edición** para aplicar los cambios realizados.
 - ▶ SICAT Endo muestra el área con la máscara en la vista **Proyección en 3D**.
 - ▶ SICAT Endo excluye las áreas con máscara del registro automático.



Para volver a ocultar el botón **Editar máscara**, en el área **Registrar la radiografía intraoral** haga clic en el botón **Ocultar opciones avanzadas**.

31 ASISTENTE DE ENDOLINE

El asistente de EndoLine le proporciona funciones para el diagnóstico y la planificación del tratamiento.

Puede ejecutar de manera opcional las siguientes opciones antes de utilizar el asistente de EndoLine:

- *Importar radiografías intraorales y asignar dientes* [▶ *Página 155 - Standalone*].
- *Registrar la radiografía intraoral* [▶ *Página 161 - Standalone*]
- *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [▶ *Página 177 - Standalone*]

En el asistente de EndoLine puede determinar con ayuda de una línea de corte el área que desee tratar. En esta área puede colocar EndoLines en los canales de las raíces.

Los EndoLines son líneas de medición que puede utilizar para marcar el canal de la raíz a tratar y localizar las puntas de las raíces. Los EndoLines sirven de base para la planificación y colocación de canales de perforación.

Para visualizar los EndoLines, SICAT Endo usa diferentes vistas. Encontrará información sobre ello en *Vistas en el asistente de EndoLine* [▶ *Página 170 - Standalone*].

SICAT Endo asigna al diente seleccionado todos los objetos que cree durante la planificación. Estos objetos pueden ser EndoLines o canales de perforación. Puede administrar y editar estos objetos en el área de trabajo **Panorámica** y en el área de trabajo **Radiografía intraoral**, así como en el **Navegador de objetos**.

Para ver los objetos creados, en SICAT Endo tiene diferentes vistas y composiciones de vistas en áreas de trabajo. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 100 - Standalone*].

El asistente de EndoLine comprende los siguientes pasos:

- *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 178 - Standalone*]
- *Colocar EndoLines* [▶ *Página 180 - Standalone*]
- *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 189 - Standalone*]


31.1 VISTAS EN EL ASISTENTE DE ENDOLINE

En cada paso del asistente de EndoLine hay disponibles diferentes vistas.

Encontrará información general sobre la adaptación de las vistas en *Ajustar las vistas* [► *Página 108 - Standalone*] y *Adaptar la vista 3D* [► *Página 122 - Standalone*].

PASO «ORIENTAR PREVIAMENTE LA REGIÓN DENTAL»

En el paso **Orientar previamente la región dental** están disponibles las siguientes vistas:

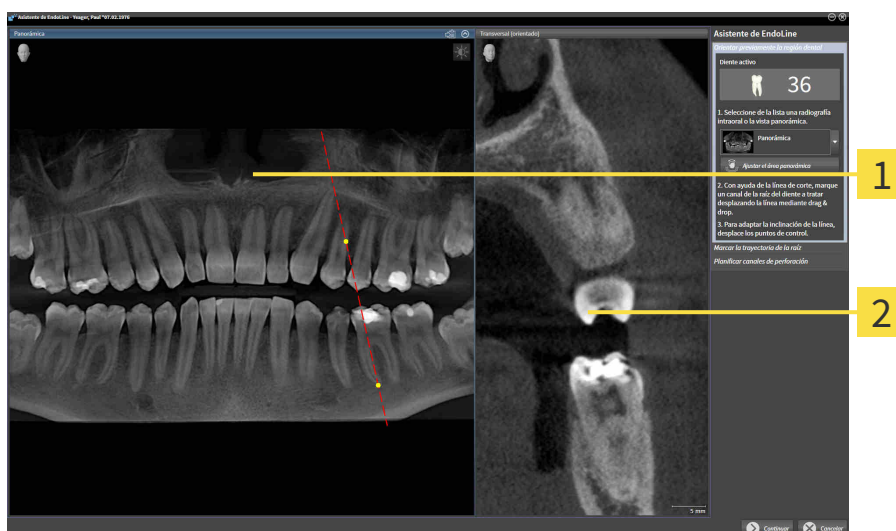

1 **Panorámica** Vista o vista **Radiografía intraoral**


2 Vista **Transversal (orientado)**

En la vista **Panorámica** o la vista **Radiografía intraoral** puede orientar previamente la vista del canal de la raíz a tratar con ayuda de una línea de corte. La vista **Radiografía intraoral** solo está disponible si ha registrado al menos una radiografía intraoral para el diente activo. Encontrará información para seleccionar un diente activo en *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [► *Página 177 - Standalone*].

En la vista **Transversal (orientado)** se muestra el diente marcado en la vista **Panorámica** o en la vista **Radiografía intraoral** desde el lateral y alineado con la línea de corte establecida.

PASO «COLOCAR ENDOLINES»

En el paso **Colocar EndoLines** están disponibles las siguientes vistas:

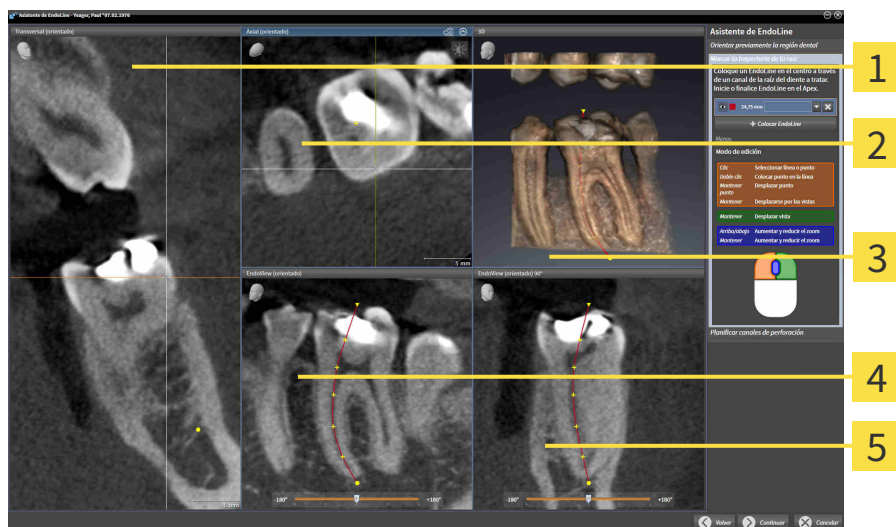

1 Vista **Transversal (orientado)**

2 Vista **Axial (orientado)**

3 **3D**Vista

4 Vista **EndoView (orientado)**

5 Vista **EndoView (orientado) 90°**

La vista **Transversal (orientado)** en el paso **Colocar EndoLines** se corresponde con la vista **Transversal (orientado)** del paso **Orientar previamente la región dental**. Muestra el diente marcado en el paso **Orientar previamente la región dental** en diagonal desde fuera hacia dentro y orientado a la línea de corte establecida.


La vista **Axial (orientado)** muestra desde arriba el diente orientado a la línea de corte establecida y marcado en el paso **Orientar previamente la región dental**.

La vista **3D** muestra el EndoLine en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 122 - Standalone*].

La **EndoView (orientado)** es una vista alineada con el EndoLine que muestra el EndoLine seleccionado proyectado a un nivel 2D. El **EndoView (orientado) 90°** es el **EndoView (orientado)** girado en 90 grados. Las dos vistas solo se muestran una vez que haya colocado un EndoLine. Encontrará más información sobre EndoView en *EndoView* [► *Página 175 - Standalone*].

PASO «PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN»

En el paso **Planificar canales de perforación** están disponibles las siguientes vistas:

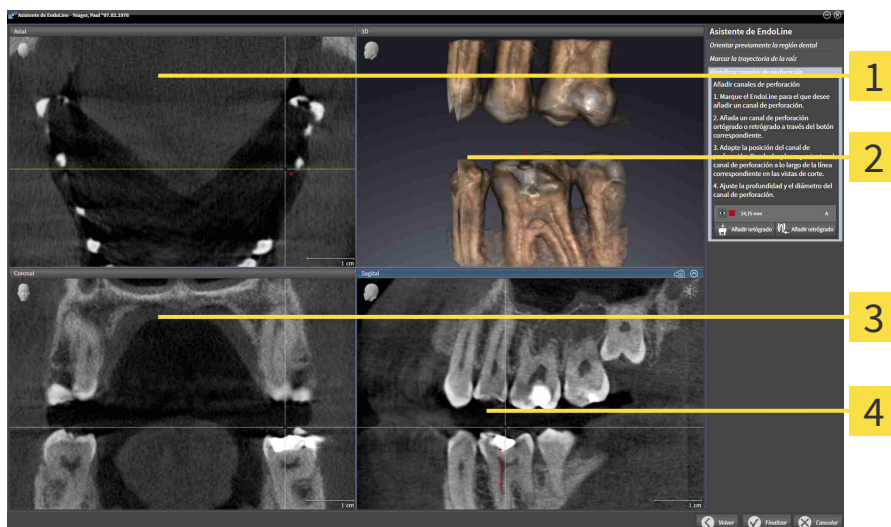

1 AxialVista

3 CoronalVista

2 3DVista

4 SagitalVista

La vista **Axial** muestra el EndoLine desde arriba.

La vista **3D** muestra el EndoLine en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 122 - Standalone*].

La vista **Coronal** muestra el EndoLine desde delante.


La vista **Sagital** muestra el EndoLine desde la derecha.



Si aún no ha planificado ningún canal de perforación, SICAT Endo mostrará al abrir el corte **Planificar canales de perforación** en el asistente de EndoLine la vista **Axial**, la vista **3D**, la vista **Coronal** y la vista **Sagital**.

VISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE CANALES DE PERFORACIÓN ORTÓGRADOS

En la planificación de los canales de perforación ortógrados están disponibles las siguientes vistas:

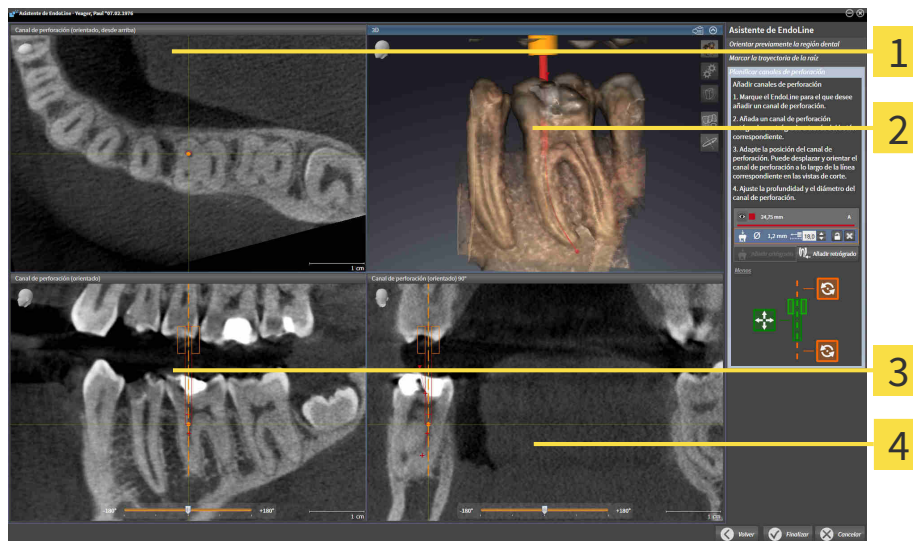

1 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

2 3DVista

3 Vista **Canal de perforación (orientado)**

4 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

La vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde arriba.


La vista **3D** muestra el canal de perforación establecido en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 122 - Standalone*].

La vista **Canal de perforación (orientado)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde delante.

La vista **Canal de perforación (orientado) 90°** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde un lateral.

VISTAS EN LA PLANIFICACIÓN DE CANALES DE PERFORACIÓN RETRÓGRADOS

En la planificación de los canales de perforación retrógrados están disponibles las siguientes vistas:

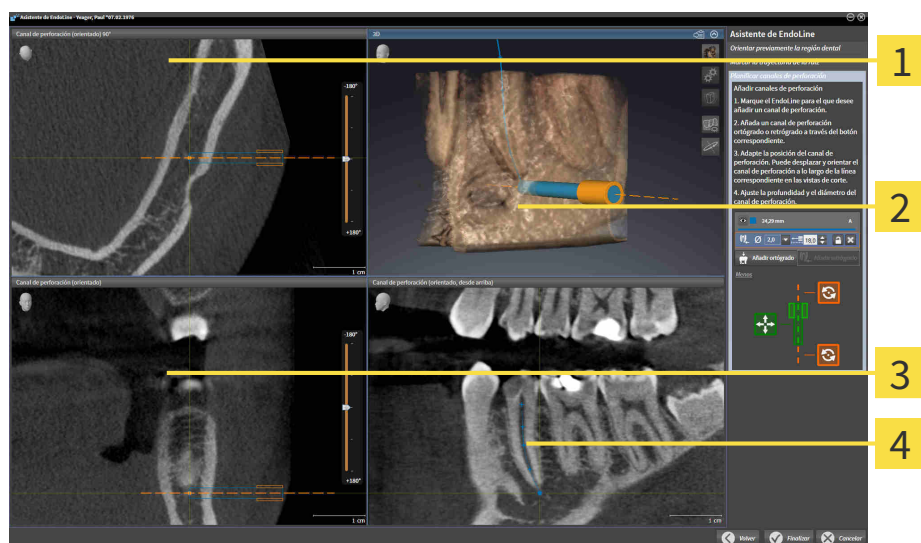

1 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

3 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 **3D**Vista

4 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

La vista **Canal de perforación (orientado) 90°** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde un lateral.


La vista **3D** muestra el canal de perforación establecido en la radiografía 3D. Encontrará información sobre la adaptación de la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 122 - Standalone*].

La vista **Canal de perforación (orientado)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde delante.

La vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)** muestra el canal de perforación orientado al EndoLine desde arriba.

31.1.1 ENDOVIEW

El software del EndoView de SICAT Endo visualiza la anatomía de las estructuras dentales complejas de un paciente proyectando y mostrando un EndoLine torcido de una radiografía 3D en un nivel 2D. Esta técnica se llama Curved Planar Reformation (CPR). Permite mostrar las estructuras torcidas desplegadas.

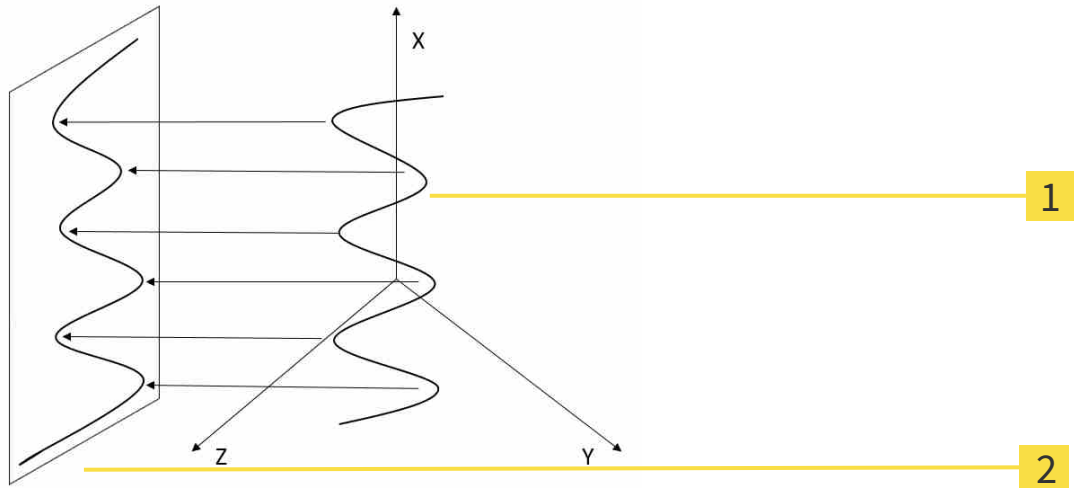

1 Radiografía 3D

2 Nivel 2D

Mediante la representación de un EndoLine en el nivel 2D, puede comprender las estructuras dentales anatómicas al detalle y detectar más fácilmente las anomalías. Al mismo tiempo, el EndoView ayuda a mejorar la precisión de las decisiones de diagnóstico y facilita la creación de un plan de tratamiento individual para el paciente.

31.1.2 GIRAR ENDOVIEW

Encontrará información general sobre el EndoView en *EndoView* [▶ *Página 175 - Standalone*].

En las vistas **EndoView (orientado)** y **EndoView (orientado) 90°** puede utilizar una corredera para girar las secciones de las imágenes.

- ☑ El paso **Colocar EndoLines** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Colocar EndoLines* [▶ *Página 180 - Standalone*].
- ☑ Ha establecido al menos un EndoLine.
- ☑ Ha seleccionado un EndoLine.

1. Active la vista **EndoView (orientado)** o la vista **EndoView (orientado) 90°** haciendo clic en la vista deseada.

▶ SICAT Endo activa la vista.



2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Desplace la corredera a la posición deseada.
5. Suelte el botón del ratón.

▶ SICAT Endo gira la sección de la imagen

▶ SICAT Endo adapta la vista **EndoView (orientado)** y la vista **EndoView (orientado) 90°**.



De manera alternativa, también puede girar la sección de la imagen haciendo clic en cualquier punto de **EndoView (orientado)** o de **EndoView (orientado) 90°** con el botón izquierdo del ratón y girar la sección de la imagen en la dirección deseada con el botón izquierdo del ratón pulsado.



El área de la corredera va de -180 grados a +180 grados y está dividida en pasos de 90 grados. Con ayuda de la corredera, puede ajustar un ángulo para el giro de la vista.


31.2 SELECCIONAR EL DIENTE PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Para poder planificar EndoLines y canales de perforación, deberá seleccionar el diente que desee tratar.

- ☑ Ha abierto el área de trabajo **Radiografía intraoral** o el área de trabajo **Panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 100 - Standalone*].



1. En la **Barra de objetos**, mueva el puntero del ratón por el área **Diente activo**.
 - ▶ Se abre la ventana **Número de diente**:

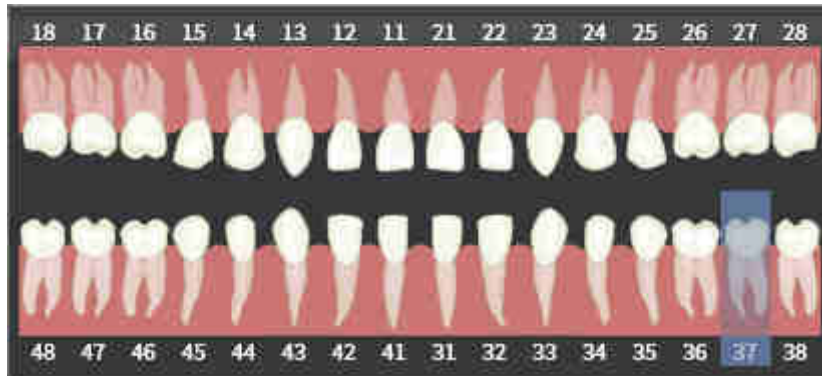

2. Mueva el puntero del ratón por encima del diente que desee tratar.
 - ▶ SICAT Endo destaca el número de diente.
3. Para seleccionar el diente destacado, haga clic en el diente con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo marca el diente en azul.
 - ▶ SICAT Endo Muestra el número de diente en la **Barra de objetos**, en el área **Diente activo**.
4. Para cerrar la ventana **Número de diente**, saque el puntero del ratón del área **Diente activo**.
 - ▶ SICAT Endo cierra la ventana **Número de diente**.

31.3 ORIENTAR PREVIAMENTE LA REGIÓN DENTAL

Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 169 - Standalone*].


En el paso **Orientar previamente la región dental**, con ayuda de una línea de corte puede adaptar las vistas de tal manera que pueda ver bien el diente y las raíces que desee tratar.

- ☑ En el área de trabajo **Radiografía intraoral** o en el área e trabajo **Panorámica**, ha seleccionado el diente que deseaba tratar mediante el esquema **Número de diente** en la **Barra de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Seleccionar el diente para la planificación del tratamiento* [► *Página 177 - Standalone*].
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 89 - Standalone*].



1. Haga clic en el símbolo **Planificando el tratamiento de la raíz con ayuda de EndoLines y canales de perforación**.

► El paso **Orientar previamente la región dental** se abre:

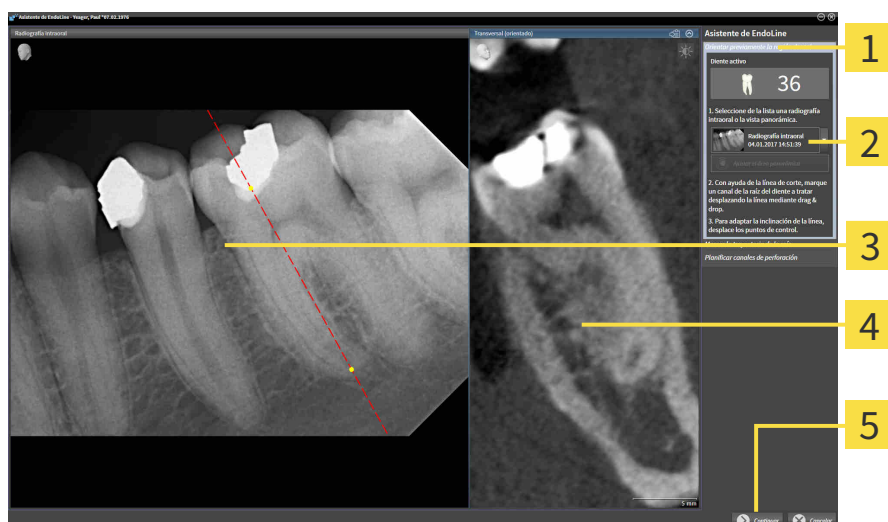

- | | |
|--|---|
| 1 Área Orientar previamente la región dental | 4 Vista Transversal (orientado) |
| 2 Lista con la vista Panorámica y radiografías intraorales | 5 Botón Continuar |
| 3 Panorámica Vista o vista Radiografía intraoral | |

2. Seleccione de la lista una radiografía intraoral o la vista panorámica en el área **Orientar previamente la región dental**.

► SICAT Endo Muestra una línea de corte con dos puntos de control amarillos en la vista de la **radiografía intraoral** o en la vista **panorámica**.



3. Para desplazar la línea de corte, posicione el puntero del ratón en la línea de corte.
 - El puntero del ratón se transforma.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace la línea de corte a la posición deseada.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón.



- ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la línea de corte.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal (orientado)** a la posición cambiada de la línea de corte.
7. Para girar la línea de corte, posicione el puntero del ratón en uno de los dos puntos de control amarillos.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
 8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 9. Gire la línea de corte en la dirección deseada.
 10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual de la línea de corte.
 - ▶ SICAT Endo adapta la vista **Transversal (orientado)** a la posición cambiada de la línea de corte.
 11. Haga clic en **Continuar**.
 - ▶ SICAT Endo lleva a cabo el ajuste de las vistas.
 - ▶ Se abre el paso **Colocar EndoLines**.

Continúe con *Colocar EndoLines* [▶ *Página 180 - Standalone*].



Para que pueda elegir para la orientación previa entre una radiografía intraoral y la vista **Panorámica**, debe haber registrado al menos una radiografía intraoral para el diente seleccionado.



Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 139 - Standalone*].

31.4 COLOCAR ENDOLINES



PRECAUCIÓN

El uso de la vista 3D para visualizar mediciones y objetos de planificación podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice la vista 3D únicamente de orientación y como fuente de información adicional.


Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [▶ *Página 169 - Standalone*].

En el paso **Colocar EndoLines** puede marcar los canales de las raíces que desee tratar en las vistas orientadas con ayuda de los EndoLines.

SICAT Endo identifica el punto inicial y el punto final al añadir un EndoLine y marca el punto inicial con un triángulo y el punto final con un círculo.

El orden de los puntos depende del número de diente anteriormente seleccionado y la posición del diente en el maxilar del paciente. En el maxilar superior, el punto inicial se encuentra por debajo del punto final; en el maxilar inferior, el punto inicial se encuentra por encima del punto final.

- ☑ Ha finalizado el paso **Orientar previamente la región dental**. Encontrará información sobre ello en *Orientar previamente la región dental* [▶ *Página 178 - Standalone*].
- ☑ El paso **Colocar EndoLines** ya está abierto.

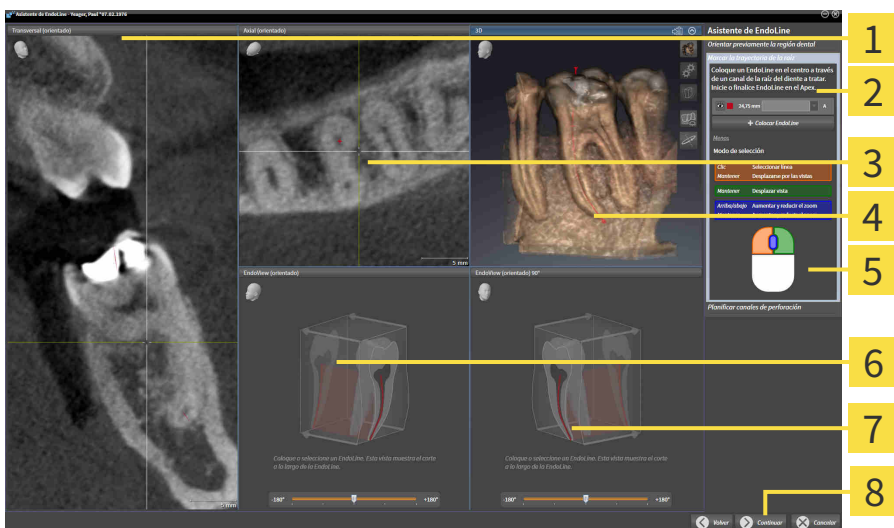

- | | |
|--|---|
| <p>1 Vista Transversal (orientado)</p> <p>2 Área Colocar EndoLines</p> <p>3 Vista Axial (orientado)</p> <p>4 3DVista</p> | <p>5 Infografía</p> <p>6 EndoView (orientado)</p> <p>7 EndoView (orientado) 90°</p> <p>8 Botón Continuar</p> |
|--|---|



1. Haga clic en el botón **Colocar EndoLine** del área **Colocar EndoLines**.
 - ▶ SICAT Endo destaca la vista **Transversal (orientado)** y la vista **Axial (orientado)**.
 - ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Sitúe el puntero del ratón en la vista **Transversal (orientado)** o en la vista **Axial (orientado)**.

3. Haga clic en el Apex o en el punto inicial con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo establece un punto de control.
4. Añada más puntos de control para marcar la trayectoria de la raíz haciendo clic en más puntos a lo largo de la trayectoria del canal de la raíz con el botón izquierdo del ratón.
5. Para finalizar el marcado del canal de la raíz, haga doble clic en el Apex o en el punto inicial.
 - ▶ SICAT Endo establece un punto de control.
 - ▶ SICAT Endo muestra todos los puntos de control así como una conexión entre los puntos en forma de EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo orienta la vista **EndoView (orientado)** y la vista **EndoView (orientado) 90°** al EndoLine.
6. En caso necesario, repita los pasos para marcar más canales de la raíz.
7. Compruebe los EndoLines colocados en la vista **EndoView (orientado)** o en la vista **EndoView (orientado) 90°**.
8. Haga clic en **Continuar**.

▶ El paso **Planificar canales de perforación** se abre.

Continúe con *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 189 - Standalone*].

Puede editar el color y el texto para la descripción y la posición de un EndoLine. Encontrará información sobre ello en *Ajustar color y texto* [▶ *Página 182 - Standalone*].

Puede editar un EndoLine desplazando, añadiendo o borrando puntos de control. Encontrará información sobre ello en *Añadir, desplazar y borrar puntos de control* [▶ *Página 183 - Standalone*].

Puede utilizar un modo de rotación en la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Girar la vista 3D* [▶ *Página 186 - Standalone*].

Puede visualizar impresiones ópticas importadas y registradas en la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Mostrar impresiones ópticas en la vista 3D* [▶ *Página 187 - Standalone*].

Puede utilizar diferentes funciones para añadir un EndoLine con ayuda de los botones del ratón. Encontrará información sobre ello en *Utilizar botón del ratón* [▶ *Página 188 - Standalone*].



Para seleccionar un EndoLine, puede hacer clic en la línea con el botón izquierdo del ratón en una de las vistas alineadas o seleccionar en el área **Colocar EndoLines**.



Para borrar un EndoLine, marque el EndoLine en el área **Colocar EndoLines** y haga clic en el botón **Borrar EndoLine** al final de la línea del EndoLine seleccionado.



Para adaptar la representación en el **EndoView (orientado)** o en el **EndoView (orientado) 90°**, puede utilizar la corredera en estas vistas. Con ayuda de la corredera, puede girar las vistas a la izquierda o a la derecha en el ángulo que desee.

31.5 AJUSTAR COLOR Y TEXTO

AJUSTAR COLOR

Para modificar el color de un EndoLine, haga lo siguiente:

1. En la línea del EndoLine, haga clic en el botón **Cambiar de color**.
 - ▶ SICAT Endo cambia el color del EndoLine.
2. Si el color no es el deseado, vuelva a hacer clic en el botón **Cambiar de color** hasta que SICAT Endo muestre el color deseado.
 - ▶ SICAT Endo muestra el nuevo color del EndoLine.

AJUSTAR TEXTO PARA LA DESCRIPCIÓN O LA INDICACIÓN DE LA POSICIÓN

Para modificar el texto para la descripción o para la indicación de la posición del EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Para introducir una descripción para el EndoLine, haga clic en el campo **Descripción/posición** en la línea del EndoLine.
 - ▶ El puntero del ratón parpadea en la posición de entrada.
2. Indique la descripción deseada para el EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo muestra la descripción .
3. Para seleccionar un texto para la indicación de la posición del EndoLine, haga clic en el símbolo de la flecha en el campo **Descripción/posición** en la línea del EndoLine.
 - ▶ SICAT Endo muestra una lista con indicaciones de posiciones.
4. Haga clic en la indicación de la posición deseada en la lista.
 - ▶ SICAT Endo muestra la indicación de la posición en el campo **Descripción/posición**.
5. Para aceptar los cambios y cerrar el campo **Descripción/posición**, haga clic con el botón izquierdo del ratón en un punto fuera del campo **Descripción/posición**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva descripción o indicación de la posición.




31.6 AÑADIR, DESPLAZAR Y BORRAR PUNTOS DE CONTROL

AÑADIR PUNTOS DE CONTROL A UN ENDOLINE

Para añadir un punto de control a un EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Posicione el puntero del ratón en el punto del EndoLine en el que desee añadir un punto de control.

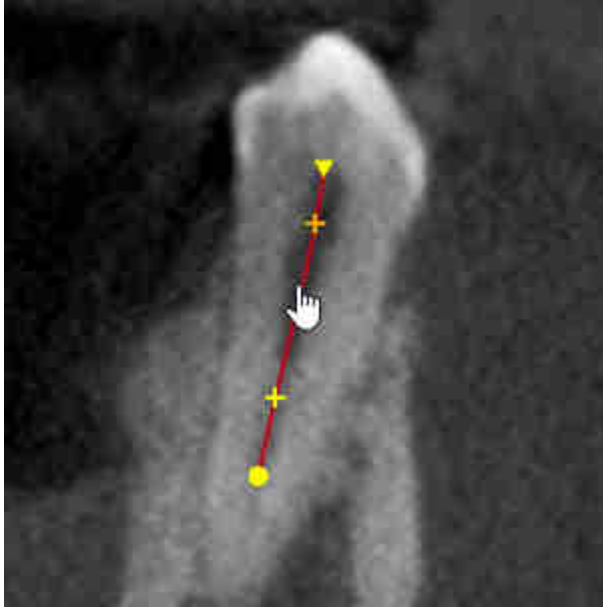

► El puntero del ratón se transforma.


2. Haga doble clic en el punto.

► SICAT Endo añade un punto de control en forma de cruz.

DESPLAZAR PUNTOS DE CONTROL DE UN ENDOLINE

Para desplazar puntos de control de un EndoLine, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón en el punto de control del EndoLine que desee desplazar.

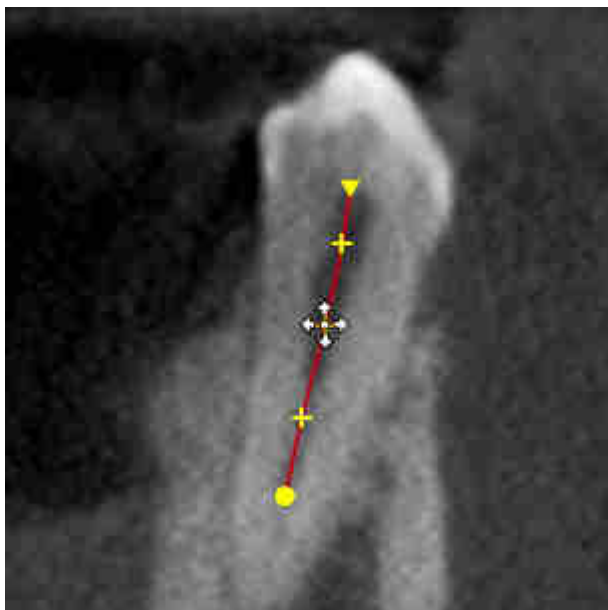


- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el ratón.
 - ▶ El punto de control sigue el movimiento del ratón.
 - ▶ SICAT Endo adapta el EndoLine de acuerdo a la nueva posición del punto de control.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual del punto de control.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva trayectoria del EndoLine.

BORRAR PUNTOS DE CONTROL DE UN ENDOLINE

Para borrar un punto de control de un EndoLine, proceda de la siguiente manera:

1. Sitúe el puntero del ratón en el punto de control del EndoLine que desee borrar.

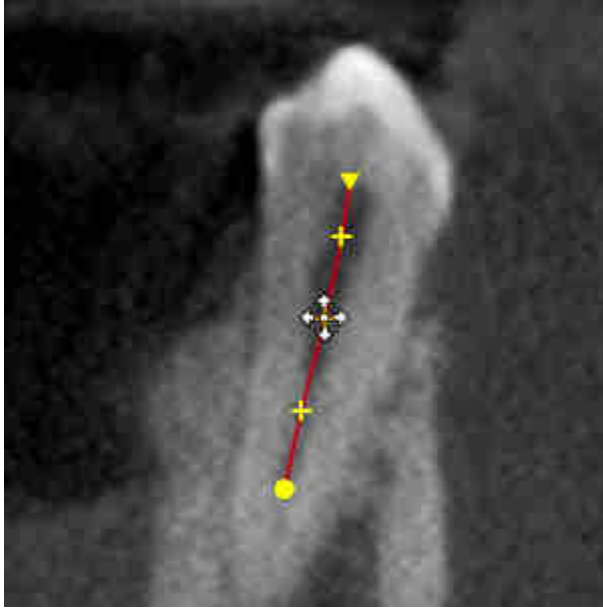

- ▶ El puntero del ratón se transforma.
2. Haga clic en el punto de control con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo marca el punto de control.
3. Pulse la tecla **Supr.**
 - ▶ SICAT Endo borra el punto de control.
 - ▶ SICAT Endo ajusta en correspondencia el punto de control.



Recuerde que el EndoLine se borrará por completo tan pronto como borre el penúltimo punto de control.

31.7 GIRAR LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [► *Página 122 - Standalone*].

Con la función **Girar la vista 3D** puede conectar y desconectar un modo de rotación para la radiografía 3D en el asistente de EndoLine. Si está conectado el modo de rotación, SICAT Endo gira la radiografía 3D en el sentido de las agujas del reloj.

Para utilizar el modo de rotación, haga lo siguiente:

Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [► *Página 107 - Standalone*].

1. Ajuste la representación de la radiografía 3D de tal manera que se muestre la sección de la imagen deseada.
2. Asegúrese de haber seleccionado el tipo de representación deseado. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [► *Página 124 - Standalone*].
3. Asegúrese de seleccionar el modo de sección deseado. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [► *Página 127 - Standalone*].



4. Haga clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - SICAT Endo gira la radiografía 3D en torno al eje vertical de la sección seleccionada.
5. Para finalizar el modo de rotación, vuelva a hacer clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - SICAT Endo finaliza el giro de la radiografía 3D.



Para finalizar el modo de rotación, también puede hacer clic en el punto que desee dentro de la vista **3D**.

31.8 MOSTRAR IMPRESIONES ÓPTICAS EN LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 122 - Standalone*].

Si ya ha importado y registrado impresiones ópticas, puede mostrar y ocultar las impresiones ópticas en el asistente de EndoLine en la vista **3D**.

Para mostrar u ocultar las impresiones ópticas, proceda de la siguiente manera:

- ☑ Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [▶ *Página 107 - Standalone*].
- ☑ Ya ha importado y registrado al menos una impresión óptica. Encontrará información sobre ello en *Importar y registrar impresiones ópticas* [▶ *Página 143 - Standalone*].



1. Para mostrar las impresiones ópticas, haga clic en el botón **Mostrar objeto**.
 - ▶ SICAT Endo muestra las impresiones ópticas.
 - ▶ SICAT Endo actualiza la representación de la radiografía 3D.




2. Para ocultar las impresiones ópticas, haga clic en el botón **Ocultar objeto**.
 - ▶ SICAT Endo oculta las impresiones ópticas.
 - ▶ SICAT Endo actualiza la representación de la radiografía 3D.



Si aún no ha importado y registrado ninguna impresión óptica, SICAT Endo no muestra el botón **Mostrar objeto** en la vista **3D**.

31.9 UTILIZAR BOTÓN DEL RATÓN

SICAT Endo muestra un gráfico que explica cómo deben utilizarse los botones del ratón a la hora de establecer un EndoLine:

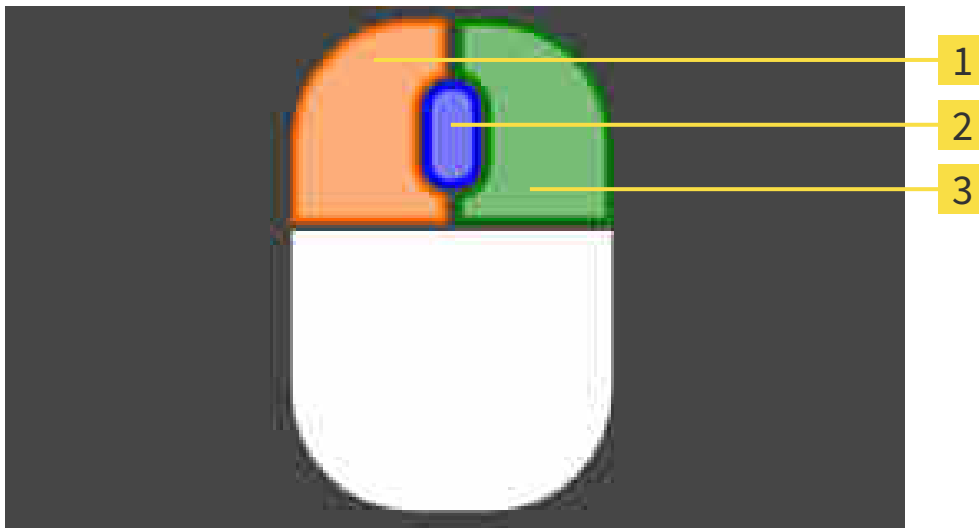

1 Botón izquierdo del ratón

3 Botón derecho del ratón

2 Rueda del ratón

Si activa un botón del ratón, SICAT Endo lo destaca en el gráfico. La acción enlazada a un botón del ratón depende del modo de edición.

SICAT Endo diferencia entre los siguientes modos de edición:

- Crear
- Editar
- Seleccionar

Dependiendo del modo de edición, tendrá disponibles diferentes acciones. Las acciones disponibles se muestran por encima del gráfico en forma de tabla y aparecen siempre con el color del botón del ratón correspondiente.

Puede ocultar y mostrar el gráfico según lo que necesite.

31.10 PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN



PRECAUCIÓN

Una profundidad de perforación incorrecta puede conllevar un tratamiento incorrecto.

Asegúrese de que la profundidad de perforación y el taladro seleccionado coincidan.


Encontrará información general sobre el asistente de EndoLine en *Asistente de EndoLine* [► *Página 169 - Standalone*].

En el paso **Planificar canales de perforación** puede añadir o editar canales de perforación ortógrados y retrógrados a los EndoLines. Puede añadir un canal de perforación ortógrado y un canal de perforación retrógrado por cada EndoLine. Un canal de perforación tiene siempre el mismo color que el EndoLine que pertenece al canal de perforación

ABRIR EL PASO «PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN»

- Ha finalizado el paso **Colocar EndoLines**. Encontrará información sobre ello en *Colocar EndoLines* [► *Página 180 - Standalone*].
- El paso **Colocar EndoLines** está abierto.
 - En el paso **Colocar EndoLines**, haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Planificar canales de perforación** se abre:

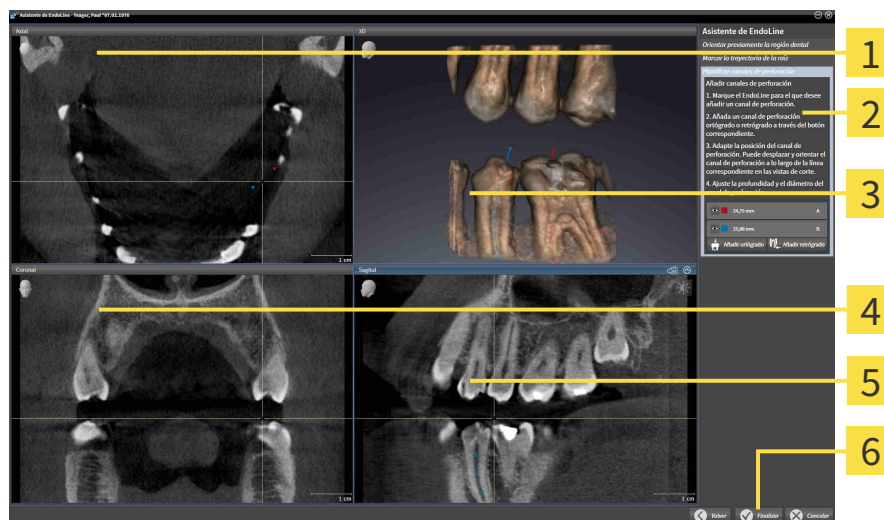

1 AxialVista

4 CoronalVista

2 Área Añadir canales de perforación

5 SagitalVista

3 3DVista

6 Botón Finalizar

PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN ORTÓGRADOS

1. En el área **Añadir canales de perforación**, seleccione el EndoLine al que desee añadir un canal de perforación ortógrado.


► SICAT Endo marca el EndoLine



2. Haga clic en el botón **Añadir ortógrado**.

► SICAT Endo añade un canal de perforación ortógrado al EndoLine marcado.

► SICAT Endo adapta las vistas de la siguiente manera:

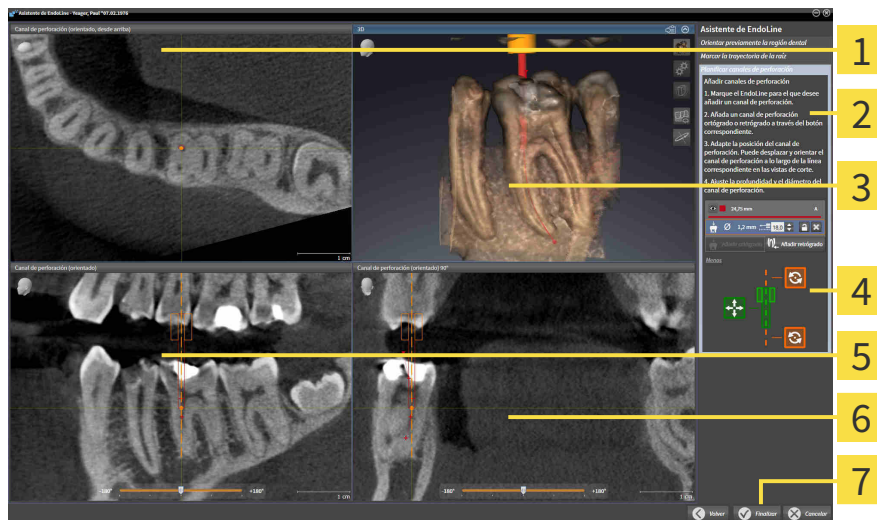

1 Vista **Canal de perforación (orientado, desde arriba)**

5 Vista **Canal de perforación (orientado)**

2 Área **Añadir canales de perforación**

6 Vista **Canal de perforación (orientado) 90°**

3 **3D**Vista

7 Botón **Finalizar**

4 Infografía



3. Para adaptar la posición del canal de perforación a lo largo del EndoLine, sitúe el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** sobre el canal de perforación.

► El puntero del ratón se transforma.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

5. Desplace el canal de perforación a la posición deseada.

6. Suelte el botón izquierdo del ratón.


► SICAT Endo mantiene la posición actual del canal de perforación.

► SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



7. Para adaptar el giro del canal de perforación, posicione el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** fuera del canal de perforación en el EndoLine.

► El puntero del ratón se transforma.

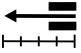8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
9. Gire el EndoLine con el canal de perforación en la dirección deseada.
10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual del EndoLine y del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.
-  11. En caso necesario, puede adaptar la posición del casquillo de perforación haciendo clic en las teclas de flechas detrás del campo **Profundidad [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva profundidad del casquillo de perforación.
12. Para finalizar la planificación de los canales de perforación, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente de EndoLine.
 - ▶ Se abre el área de trabajo **Radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra los canales de perforación planificados.

PLANIFICAR CANALES DE PERFORACIÓN RETRÓGRADOS

1. En el área **Añadir canales de perforación**, seleccione el EndoLine al que desee añadir un canal de perforación retrógrado.


► SICAT Endo marca el EndoLine



2. Haga clic en el botón **Añadir retrógrado**.

► SICAT Endo añade un canal de perforación retrógrado al EndoLine marcado.

► SICAT Endo adapta las vistas de la siguiente manera:

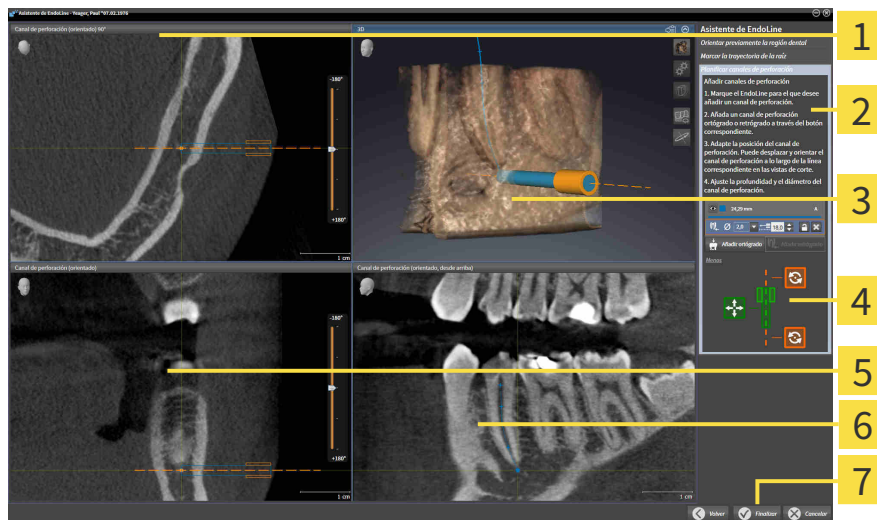

- | | |
|--|--|
| 1 Vista Canal de perforación (orientado) 90° | 5 Vista Canal de perforación (orientado) |
| 2 Área Añadir canales de perforación | 6 Vista Canal de perforación (orientado, desde arriba) |
| 3 3D Vista | 7 Botón Finalizar |
| 4 Infografía | |



3. Para adaptar la posición del canal de perforación a lo largo del EndoLine, sitúe el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** sobre el canal de perforación.

► El puntero del ratón se transforma.

4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

5. Desplace el canal de perforación a la posición deseada.

6. Suelte el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Endo mantiene la posición actual del canal de perforación.

► SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



7. Para adaptar el giro del canal de perforación, posicione el puntero del ratón en la vista **Canal de perforación (orientado)** o en la vista **Canal de perforación (orientado) 90°** fuera del canal de perforación en el EndoLine.

► El puntero del ratón se transforma.

8. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
9. Gire el EndoLine con el canal de perforación en la dirección deseada.
10. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene el giro actual del EndoLine y del canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo adapta las demás vistas a la posición cambiada del canal de perforación.



11. En caso necesario, puede adaptar la posición del casquillo de perforación haciendo clic en las teclas de flechas detrás del campo **Profundidad [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra la nueva profundidad del casquillo de perforación.



12. En caso necesario, puede adaptar el diámetro del canal de perforación retrógrado haciendo clic en el símbolo de la flecha detrás del campo **Diámetro [mm]**.
 - ▶ SICAT Endo muestra una lista de diámetros disponibles.

13. Haga clic en el diámetro deseado.
 - ▶ SICAT Endo muestra el nuevo diámetro del canal de perforación.

14. Para finalizar la planificación de los canales de perforación, haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ Se cierra el asistente de EndoLine.
 - ▶ Se abre el área de trabajo **Radiografía intraoral**.
 - ▶ SICAT Endo muestra los canales de perforación planificados.

BLOQUEAR CANALES DE PERFORACIÓN

Utilice esta función para proteger los canales de perforación de los cambios.

Para bloquear un canal de perforación, haga lo siguiente:

- El canal de perforación ya está marcado.



- Haga clic en el símbolo **Bloquear objeto**.
 - ▶ SICAT Endo bloquea el canal de perforación para su edición.
 - ▶ SICAT Endo bloquea el EndoLine correspondiente.

DESBLOQUEAR CANALES DE PERFORACIÓN

Para desbloquear un canal de perforación, haga lo siguiente:

- El canal de perforación está bloqueado.
- El canal de perforación ya está activado.



- Haga clic en el símbolo **Desbloquear objeto**.
 - ▶ SICAT Endo desbloquea el canal de perforación.
 - ▶ SICAT Endo desbloquea el EndoLine correspondiente.

ELIMINAR CANALES DE PERFORACIÓN

Para eliminar un canal de perforación, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el área **Añadir canales de perforación** en el objeto planificado Endo que contenga el canal de perforación que desee borrar.
 - ▶ SICAT Endo marca el objeto planificado Endo.
2. Haga clic en el objeto planificado Endo en el canal de perforación que desee borrar.
 - ▶ SICAT Endo marca el canal de perforación.
3. Al final de la línea, haga clic en el botón **Eliminar canal de perforación**.
 - ▶ SICAT Endo elimina el canal de perforación.



Si ha bloqueado un canal de perforación para su edición, tampoco podrá editar el EndoLine correspondiente. Para poder editar el EndoLine, deberá desbloquear el canal de perforación correspondiente.

32 MEDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁNGULOS

Existen dos tipos de mediciones diferentes en SICAT Endo:



- Mediciones de distancias




- Mediciones de ángulos

Las herramientas para añadir mediciones se encuentran en el paso **Diagnosticar** de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Puede añadir mediciones en todas las vistas de corte 2D. Cada vez que añada una medición, SICAT Endo la añade también al grupo **Mediciones** en el **Navegador de objetos**.

Para las mediciones están disponibles las siguientes acciones:

- *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 196 - Standalone*]
- *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 197 - Standalone*]
- *Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas* [▶ *Página 199 - Standalone*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: encontrará información sobre ello en Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*].
- *Enfocar mediciones, eliminar mediciones y deshacer y rehacer acciones de medición: encontrará más información al respecto en Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 95 - Standalone*].

32.1 AÑADIR MEDICIONES DE DISTANCIAS

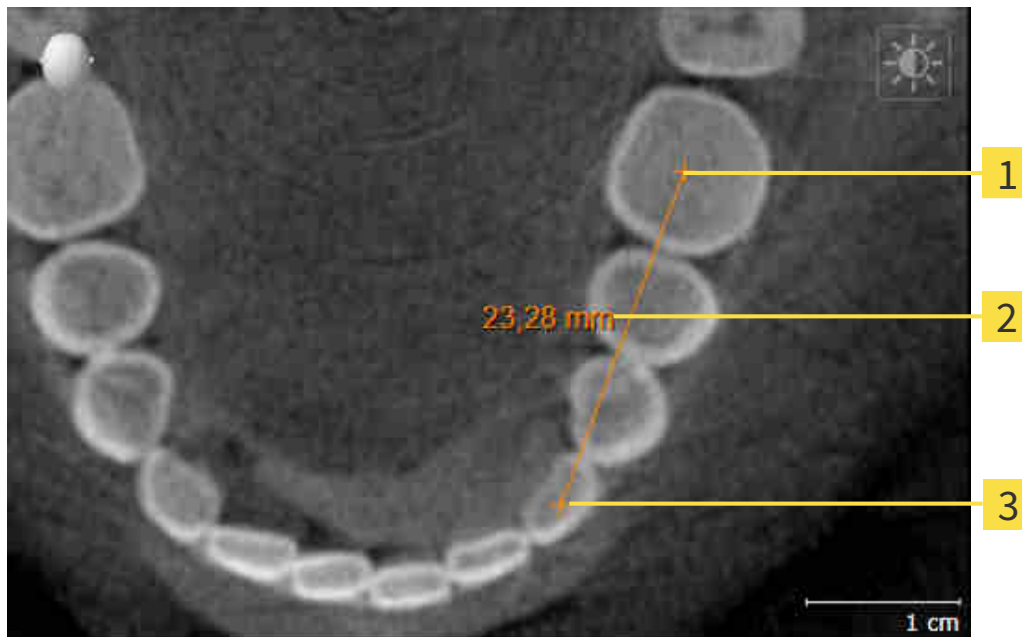

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

Para añadir una medición de distancia, haga lo siguiente:

El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.




1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de distancias (D)**.
 - ▶ SICAT Endo añade una nueva medición de distancia al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de distancias.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra una línea de distancia entre el punto de inicio y el puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra la distancia actual entre el punto de inicio y el puntero del ratón en el centro de la línea de distancia y en el **Navegador de objetos**.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final de la medición de distancias y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

32.2 AÑADIR MEDICIONES DE ÁNGULOS

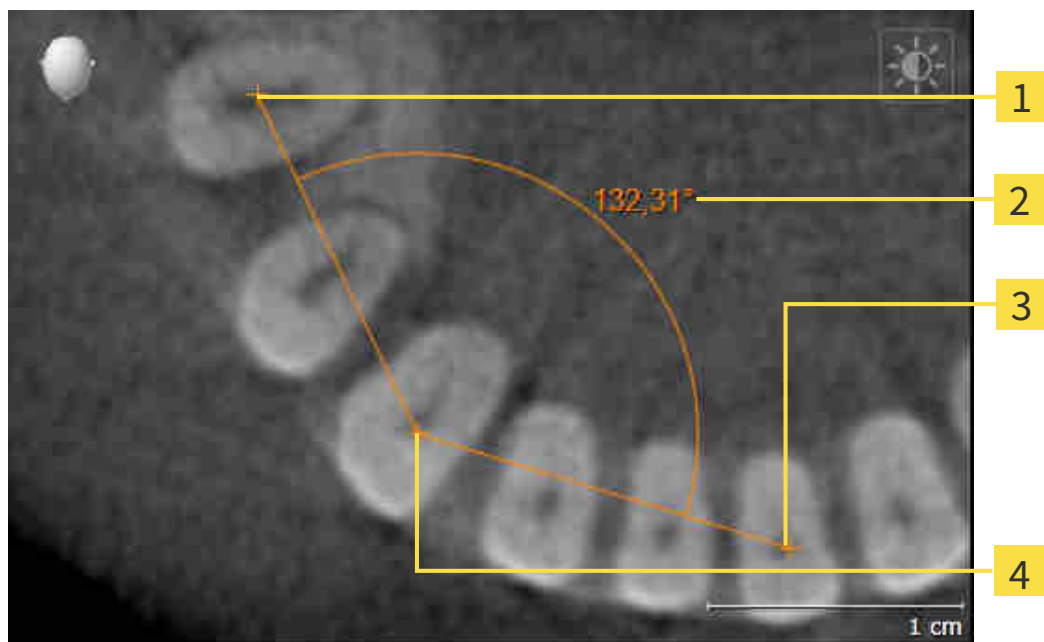

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

4 Punto más alto

Para añadir una medición de ángulo, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.



1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de ángulo (A)**.
 - ▶ SICAT Endo añade una nueva medición de ángulo al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de ángulos.
 - ▶ SICAT Endo indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra el primer lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el punto de inicio hasta el puntero del ratón.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto más alto de la medición de ángulos y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo indica el vértice mediante una cruz pequeña.
 - ▶ SICAT Endo muestra el segundo lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el vértice hasta el puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el ángulo actual entre los dos lados de la medición y en el **Navegador de objetos**.

5. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final del segundo lado y haga clic con el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Endo indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

32.3 DESPLAZAR MEDICIONES, PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES Y LECTURAS

DESPLAZAR MEDICIONES

Para desplazar una medición, haga lo siguiente:

SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 95 - Standalone*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre una línea de la medición.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la medición.
 - ▶ La medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la medición.

DESPLAZAR PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES

Para desplazar un punto de medición individual, haga lo siguiente:

SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 95 - Standalone*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el punto de medición que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada del punto de medición.
 - ▶ El punto de medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ La lectura cambia mientras desplaza el ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la lectura.

DESPLAZAR LECTURAS

Para desplazar una lectura, haga lo siguiente:

☑ SICAT Endo ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 93 - Standalone*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 95 - Standalone*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la lectura que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la lectura.
 - ▶ La lectura sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra una línea de puntos entre la lectura y la respectiva medición.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo mantiene la posición actual de la lectura.



Tras haber desplazado el usuario el valor de una medición, SICAT Endo determina el valor de una posición absoluta. Para que el valor vuelva a ser relativo a la medición, haga doble clic en el valor.

33 INFORMAR AL PACIENTE



PRECAUCIÓN

Utilizar el impreso con fines de diagnóstico podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice exclusivamente las funciones de visualización de imágenes médicas de la interfaz de usuario del software para realizar un diagnóstico y planificar el tratamiento.

Con imágenes específicas de un paciente puede explicar a ese paciente su diagnóstico y aclarar el tratamiento. La explicación al paciente tiene lugar en dos pasos:

1. En su consulta en SICAT Endo
2. A través de una información del paciente mediante impreso.

El contenido de los impresos puede redactarse en pantalla durante las explicaciones.

Gracias al impreso, el paciente puede entender mejor los resultados y luego comentarlos con otras personas.

La creación de impresos consta de los siguientes pasos:

- *Crear imágenes y capturas de pantalla* [▶ *Página 202 - Standalone*]
- *Preparar impresos* [▶ *Página 205 - Standalone*]
- *Generar impresos* [▶ *Página 207 - Standalone*]

33.1 CREAR IMÁGENES Y CAPTURAS DE PANTALLA

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [► *Página 201 - Standalone*].

Encontrará información general sobre la manera de administrar imágenes y capturas de pantalla en *Objetos de SICAT Endo* [► *Página 96 - Standalone*].

Existen dos herramientas de dibujo:

- **Dibujar flecha**
- **Dibujar círculo**

DIBUJAR FLECHAS

Para dibujar una flecha, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha orientado el volumen de acuerdo con sus requisitos. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [► *Página 134 - Standalone*].
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.

1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar la punta de la flecha y mantenga el botón pulsado.
4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra una flecha en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el extremo de la flecha coincide con la posición del puntero del ratón.
5. Sitúe el puntero del ratón en la posición deseada para el extremo de la flecha y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra la flecha terminada en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
6. Haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
 - ▶ SICAT Endo sale del modo de dibujar flechas.

DIBUJAR CÍRCULOS

Para dibujar un círculo, haga lo siguiente:

- Ya ha alineado el volumen en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 134 - Standalone*].
- El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.

1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar el centro del círculo y mantenga el botón pulsado.
4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra un círculo en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el radio del círculo coincide con la distancia entre el centro y la posición del puntero del ratón.
5. Mueva el puntero hasta alcanzar el radio deseado y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Endo muestra el círculo terminado en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
6. Haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
 - ▶ SICAT Endo sale del modo de dibujar círculos.



Mientras la herramienta de dibujo **Dibujar flecha** o la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** está activa, puede crear varios objetos de dibujo consecutivamente. Para cancelar el uso de una herramienta de dibujo, haga clic en un punto fuera de la vista en cuestión o pulse la tecla **ESC**.

AJUSTAR HERRAMIENTAS DE DIBUJO

La herramienta de dibujo **Dibujar flecha** y la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** pueden ajustarse por separado. Los cambios en los ajustes afectan solo a los objetos de dibujo creados posteriormente.


Para ajustar una herramienta de dibujo, haga lo siguiente:

- El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Ajustar herramienta de dibujo** junto al símbolo **Dibujar flecha** o junto al símbolo **Dibujar círculo**, según corresponda.

- ▶ Se abre la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**:

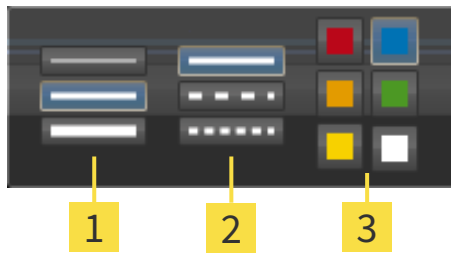

1 Símbolos para el **Grosor de línea**

2 Símbolos para el **Tipo de línea**

3 Símbolos para el **Color de línea**

2. Haga clic en los símbolos que desee para ajustar el **Grosor de línea**, el **Tipo de línea** y el **Color de línea** de la herramienta de dibujo.
3. Haga clic en un punto cualquiera fuera de la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.

- ▶ SICAT Endo cierra la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.
- ▶ SICAT Endo guarda los ajustes en su perfil de usuario.
- ▶ SICAT Endo aplica los nuevos ajustes a los objetos de dibujo creados desde ahora.

AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA A LA VENTANA "CREAR IMPRESO"

Puede crear capturas de pantalla de todas las vistas, en todas las áreas de trabajo y en todas las ventanas, siempre y cuando la vista incluya el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

Para añadir capturas de pantalla al impreso, haga lo siguiente:



1. Para hacer una captura de pantalla de una vista, haga clic en la **Barra de herramientas de la vista** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
2. Para hacer una captura de pantalla de toda el área de trabajo, haga clic en la **Barra de herramientas del área de trabajo** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
 - ▶ SICAT Endo crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen de pantalla** en el **Navegador de objetos** y activa el objeto.
 - ▶ La captura de pantalla está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 - ▶ SICAT Endo copia una captura de pantalla en el portapapeles de Windows.

Continúe con *Preparar impresos* [▶ *Página 205 - Standalone*].

33.2 PREPARAR IMPRESOS

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [► *Página 201 - Standalone*].

Para preparar impresos, están disponibles las siguientes acciones:

- Abrir la ventana **Creación del informe**
- Modificar ajustes de impresos
- Preparar elementos

ABRIR LA VENTANA "CREACIÓN DEL INFORME"

- ☑ Ha creado al menos un objeto **Imagen** o un objeto **Imagen de pantalla**.
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en Barra de herramientas del flujo de trabajo.



- Haga clic en el símbolo **Crear impreso de información al paciente**.
- ▶ Se abre la ventana **Creación del informe**:

MODIFICAR AJUSTES DE IMPRESOS

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.
1. Haga clic en el símbolo para la disposición deseada de las imágenes en el área **Ajustes de la galería de imágenes**:
 - ▶ SICAT Endo muestra las imágenes de acuerdo con el ajuste deseado.
 2. En el área **Ajustes globales**, haga clic en el botón con el tamaño del papel que desee.
 - ▶ SICAT Endo modifica el tamaño del papel de acuerdo con el ajuste deseado.
 3. Active o desactive la casilla de comprobación **Anonimizar información del paciente**.
 - ▶ SICAT Endo muestra en el impreso la información real del paciente o la información anonimizada del paciente de acuerdo con el ajuste seleccionado.

PREPARAR ELEMENTOS PARA IMPRESOS

La ventana **Creación del informe** muestra capturas de pantalla de objetos **Imagen** y capturas de pantalla de objetos **Imagen de pantalla**. Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [► *Página 202 - Standalone*].

Si desea preparar elementos para impresos, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.



1. Si desea ocultar un elemento en el impreso, desactive la casilla de comprobación del elemento.
 - ▶ SICAT Endo oculta el elemento en el impreso.



2. Si desea que SICAT Endo muestre una sola imagen en una página, haga clic en el símbolo **Mostrar imagen en una sola página**.



3. Si desea añadir una descripción a un elemento, haga clic en el símbolo **Editar la descripción de imagen** del elemento.
 - ▶ SICAT Endo muestra una versión ampliada del elemento y un campo de texto:
4. Introduzca un texto en el campo de texto.
 - ▶ Si el texto introducido es parte de un módulo de texto existente, SICAT Endo muestra la lista de módulos de texto.
5. Haga clic en el módulo de texto deseado.
 - ▶ SICAT Endo añade el módulo de texto en el campo de texto.
6. Si el texto deseado no existe como módulo de texto, introduzca un texto nuevo.
7. Haga clic en el botón **OK**.
 - ▶ SICAT Endo guarda el texto como descripción de la captura de pantalla.
 - ▶ Si el texto introducido no existe como módulo de texto, SICAT Endo guarda la descripción como nuevo módulo de texto en su perfil de usuario.
8. Si desea modificar el orden de los elementos en el impreso, hágalo mediante arrastrar y soltar.



Al situar el puntero del ratón sobre un módulo de texto, SICAT Endo muestra el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**. Si hace clic en el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**, SICAT Endo elimina el módulo de texto de su perfil de usuario.



En la ventana que muestra las versiones ampliadas de los elementos puede cambiar entre los elementos haciendo clic en el botón **Siguiente elemento** y el botón **Elemento anterior**.

Puede eliminar por completo elementos del impreso por medio del **Navegador de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 95 - Standalone*].

Continúe con *Generar impresos* [▶ *Página 207 - Standalone*].



SICAT Endo utiliza el logotipo de la consulta y el texto informativo de la consulta que se hayan configurado en los ajustes generales. Encontrará más información al respecto en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 231 - Standalone*].

33.3 GENERAR IMPRESOS

Para producir un impreso, están disponibles las siguientes acciones:

- Guardar impreso como archivo PDF
- Imprimir impreso

GUARDAR IMPRESO COMO ARCHIVO PDF

La ventana **Creación del informe** ya está abierta:



1. En el área **Edición**, haga clic en el botón **Exportación de PDF**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
2. Vaya hasta el directorio donde quiera guardar el impreso.
3. Escriba un nombre en el campo **Nombre del archivo** y haga clic en **Guardar**.
 - ▶ La ventana del explorador de archivos de Windows se cierra.
 - ▶ SICAT Endo guarda el impreso como archivo PDF.



SICAT Endo también guarda el archivo PDF en la historia clínica.

IMPRIMIR IMPRESO



Para que los impresos tengan una calidad adecuada, se necesita una impresora que cumpla determinados requisitos. Encontrará más información al respecto en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 8 - Standalone*].



- La ventana **Creación del informe** ya está abierta.
1. Haga clic en el botón **Imprimir**.
 - ▶ Se abre la ventana **Drucken**.
 2. Seleccione la impresora que desee y modifique los ajustes de la impresora si es necesario.
 3. Haga clic en **Drucken**.
 - ▶ SICAT Endo envía el impreso a la impresora.

34 EXPORTACIÓN DE DATOS

Puede exportar datos.

Puede exportar los estudios de la historia clínica abierta actualmente.

SICAT Suite puede exportar los siguientes datos:

- Historias clínicas (DICOM)
- Estudios 3D
- Documentos

Los datos exportados pueden contener los elementos siguientes:

TIPO DE DATOS	FORMATO DE EXPORTACIÓN
Radiografías 3D	DICOM
Estudios 3D	Propietario de SICAT
Documento	PDF

SICAT Suite exporta radiografías 3D y estudios a archivos ZIP o a directorios DICOM. En caso necesario, SICAT Suite puede anonimizar los datos de paciente para la exportación.



Para exportar documentos, seleccione documentos en el área **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** y haga clic en el botón **Transferir**. Se abrirá una ventana del explorador de archivos de Windows donde podrá seleccionar un directorio de destino.

Para exportar datos, realice las siguientes acciones en el orden indicado:

- Abra la ventana **Transferir datos**. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Transferir datos"* [▶ *Página 209 - Standalone*].
- Exporte los datos deseados. Encontrará información sobre ello en *Exportar datos* [▶ *Página 210 - Standalone*].

34.1 ABRIR LA VENTANA "TRANSFERIR DATOS"

Para exportar datos, en primer lugar debe abrir la ventana **Transferir datos**.

Para abrir la ventana **Transferir datos** en la versión independiente de SICAT Suite, realice una de las siguientes acciones:



- Si hay una historia clínica activa actualmente, haga clic en el símbolo **Transferir datos** de la **Barra de exploración**.
 - ▶ Se abre la ventana **Transferir datos**.
- Dentro de la ventana **SICAT Suite Home**, haga clic en el botón **Transferir datos**.
 - ▶ Se abre la ventana **Transferir datos**.
- En la ventana **Historias clínicas activas**, seleccione una radiografía 3D, un estudio o un proyecto de planificación y haga clic en el botón **Transferir datos**.
 - ▶ SICAT Suite activa la historia clínica y abre la ventana **Transferir datos** para los datos seleccionados.
- En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione una historia clínica y haga clic en el botón para transferir el paciente seleccionado.
 - ▶ SICAT Suite activa la historia clínica y abre la ventana **Transferir datos**. Todas las radiografías 3D y los proyectos de planificación de la historia clínica se seleccionan para la exportación.
- En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione una radiografía 3D o un proyecto de planificación y haga clic en el botón **Transferir datos**.
 - ▶ SICAT Suite activa la historia clínica y abre la ventana **Transferir datos**.




SICAT Suite exporta solamente las radiografías 3D y los proyectos de planificación seleccionados de la historia clínica activa.

Continúe con *Exportar datos* [▶ *Página 210 - Standalone*].

34.2 EXPORTAR DATOS

Para exportar estudios, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Transferir datos** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Transferir datos"* [► *Página 209 - Standalone*].

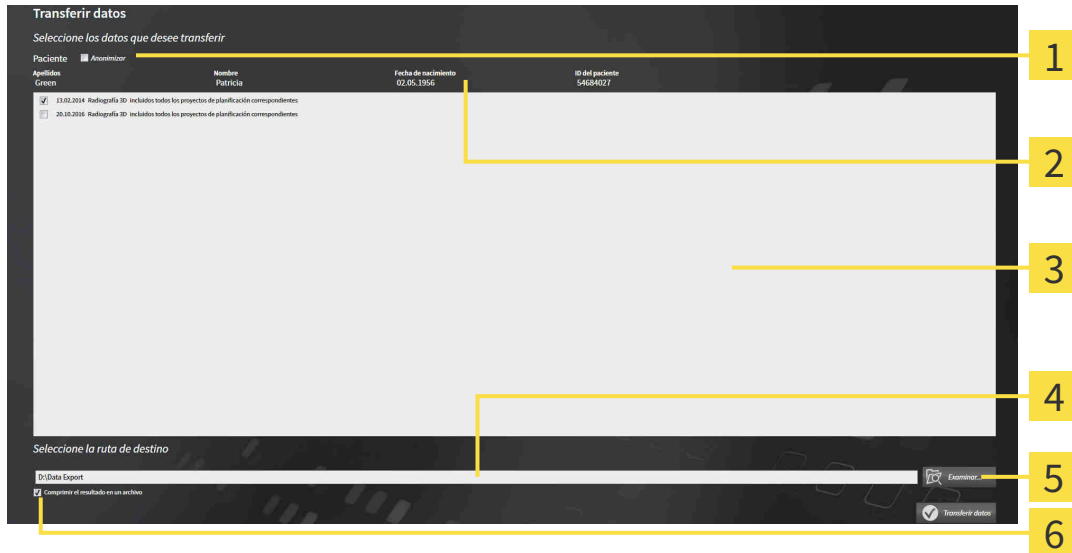

- | | |
|--|--|
| 1 Casilla de comprobación Anonimizar | 4 Campo Seleccione la ruta de destino |
| 2 Atributos de la historia clínica | 5 Botón Transferir datos |
| 3 Lista de estudios 3D | 6 Casilla de comprobación Comprimir el resultado en un archivo |

- Si lo desea, active la casilla de comprobación **Anonimizar** en la ventana **Transferir datos**.
 - Los atributos de la historia clínica exportada cambian a **Paciente** para **Apellidos**, a **Anónimo** para **Nombre** y a **01.01.** con año de nacimiento para **Fecha de nacimiento**. Los atributos de la historia clínica en el archivador de historias clínicas permanecen invariables.
- Asegúrese de que estén seleccionados los estudios 3D deseados del paciente deseado.



- Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Buscar carpeta**.
- En la ventana **Buscar carpeta**, seleccione una carpeta de destino y haga clic en **OK**.
 - La ventana **Buscar carpeta** se cierra y SICAT Suite transfiere la ruta de la carpeta deseada al campo **Seleccione la ruta de destino**.
- Active o desactive la casilla de comprobación **Comprimir el resultado en un archivo**.



- Haga clic en el botón **Transferir datos**.
 - SICAT Suite exporta los estudios seleccionados a un archivo ZIP o a la carpeta seleccionada.

Tanto los archivos ZIP como las carpetas contienen las radiografías 3D en formato DICOM y datos de planificación en un formato de archivo propio. Las radiografías 3D pueden verse con cualquier visor DICOM, y los datos de planificación, con la aplicación SICAT correspondiente.

35 PROCESO DE PEDIDO


Para encargar el producto deseado, haga lo siguiente:


- En SICAT Endo, coloque los datos de planificación deseados para plantillas de perforación en la cesta de la compra. Encontrará información sobre ello en *Colocar plantillas de perforación en la cesta de la compra* [▶ *Página 212 - Standalone*].
- Compruebe la cesta de la compra e inicie el pedido. Encontrará información sobre ello en *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 217 - Standalone*].
- Termine el pedido directamente en el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite o en otro PC con una conexión activa a Internet. Encontrará información al respecto en *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 218 - Standalone*] o en *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 222 - Standalone*].



Puede añadir a la cesta de la compra pedidos que pertenezcan a pacientes, radiografías 3D y aplicaciones diferentes. El contenido de la cesta de la compra se conserva al salir de SICAT Suite.

35.1 COLOCAR PLANTILLAS DE PERFORACIÓN EN LA CESTA DE LA COMPRA

 **PRECAUCIÓN** **El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.**
 Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.

 **PRECAUCIÓN** **Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.**

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

Encontrará información general sobre el proceso de pedido en *Proceso de pedido* [► *Página 211 - Standalone*].


En SICAT Endo se coloca en el primer paso del proceso de pedido una **SICAT GUIDE (ENDO)** plantilla de perforación en la cesta de la compra. Para poder colocar una **SICAT GUIDE (ENDO)** en la cesta de la compra, debe cumplir determinados requisitos. Si no cumple todos los requisitos, SICAT Endo lo notifica.

SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS

- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 89 - Standalone*].



1. Haga clic en el símbolo **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)**.
 ► Se abre la ventana **Pedido incompleto**:

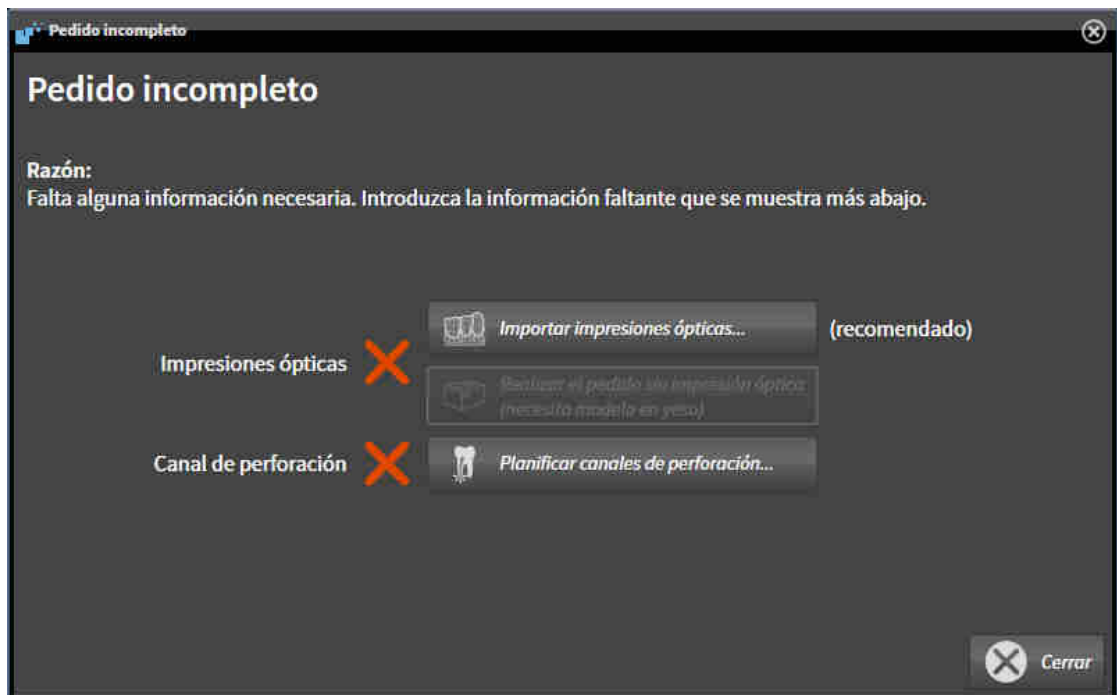

2. Si todavía no ha registrado ninguna impresión óptica, haga clic en el botón **Importar impresiones ópticas** e importe una impresión óptica que sea adecuada para la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Impresiones ópticas* [► *Página 142 - Standalone*].

3. Si todavía no ha planificado ningún canal de perforación, haga clic en el botón **Planificando canales de perforación** y coloque como mínimo un canal de perforación. Encontrará información sobre ello en *Planificar canales de perforación* [▶ *Página 189 - Standalone*].



Es posible que tenga que adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica antes de importar las impresiones ópticas. Puede activar la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** directamente desde la ventana **Importar y registrar impresiones ópticas** en el paso **Registrar** haciendo clic en el botón **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 139 - Standalone*].



Si en lugar de impresiones ópticas quiere enviar impresiones de yeso a SICAT, también puede colocar plantillas de perforación sin impresiones ópticas en la cesta de la compra haciendo clic en el botón **Realizar el pedido sin impresión óptica (necesita modelo en yeso)** de la ventana **Pedido incompleto**. A continuación, el paso **Pedir plantilla de perforación** muestra la información **Este pedido no contiene ninguna impresión óptica. Envíe los modelos de yeso correspondientes a SICAT**.

SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS


- Ya ha importado al menos una impresión óptica.
- Ya ha colocado EndoLines.
- Ya ha colocado canales de perforación.
- El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 89 - Standalone*].



- Haga clic en el símbolo **Encargando SICAT GUIDE (ENDO)**.
- ▶ Se abre la ventana **Pedir plantilla de perforación**.

COMPRUEBE SU PEDIDO EN LA VENTANA PEDIR PLANTILLA DE PERFORACIÓN

☑ La ventana **Pedir plantilla de perforación** ya está abierta:

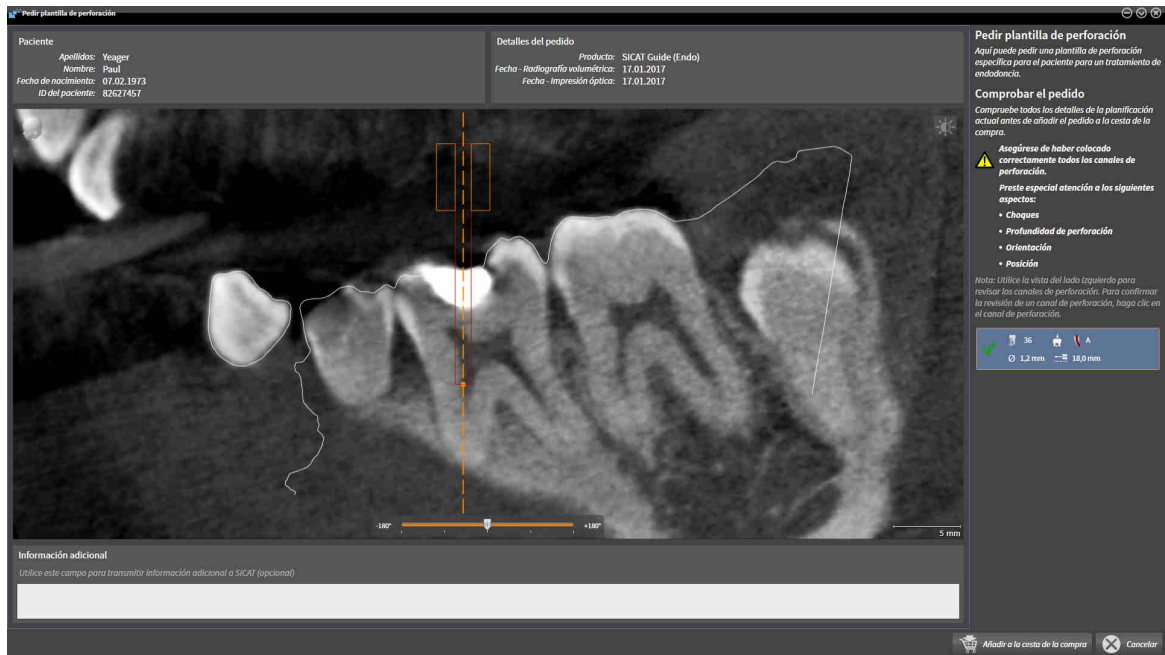

1. En el área **Paciente** y en el área **Detalles del pedido**, compruebe si la información del paciente y la información de la radiografía son correctas.
2. Revise si ha colocado correctamente todos los canales de perforación.
3. Para confirmar la comprobación de un canal de perforación, marque el objeto planificado Endo correspondiente en el área **Comprobar el pedido**.
 - ▶ SICAT Endo marca el objeto planificado Endo.
4. Ponga una marca de verificación.
 - ▶ SICAT Endo muestra una marca de verificación verde.
5. Repita los pasos para todos los canales de perforación que contenga su pedido.
6. Si lo desea, introduzca información adicional para SICAT en el campo **Información adicional**.
7. Haga clic en el botón **Añadir a la cesta**.



- ▶ SICAT Endo coloca los datos de planificación deseados para **SICAT GUIDE (ENDO)** en la cesta de la compra de SICAT Suite.
- ▶ La ventana **Pedir plantilla de perforación** se cierra.
- ▶ SICAT Endo abre la cesta de la compra de SICAT Suite.



Puede añadir un pedido a la cesta de la compra únicamente si ha revisado todos los canales de perforación planificados y ha confirmado la revisión para cada canal de perforación.



En caso de haber detectado un error durante la comprobación de los canales de perforación, pero si ya ha confirmado la comprobación poniendo al menos una marca de verificación, haga clic en el botón **Cancelar** y, a continuación, realice de nuevo los pasos para la comprobación de su pedido.



Siempre que haya un pedido en la cesta de la compra, ya no podrá sobrescribir impresiones ópticas, EndoLines ni canales de perforación. No podrá volver a hacerlo hasta que finalice o elimine el pedido. Si sobrescribe o elimina las impresiones ópticas, EndoLines o canales de perforación de una planificación, no podrá volver a encargar la misma plantilla de perforación.



Puede cancelar el pedido haciendo clic en **Cancelar**.

Continúe con *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 217 - Standalone*].

35.2 ABRIR LA CESTA DE LA COMPRA



El icono **Cesta de la compra** muestra el número de elementos que hay en la cesta de la compra.

- ☑ La cesta de la compra contiene al menos un producto.



- Si la cesta de la compra no está abierta ya, haga clic en el botón **Cesta de la compra** de la **Barra de exploración**.
- ▶ Se abre la ventana **Cesta de la compra**.

Continúe con la siguiente acción:

- *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 217 - Standalone*]

35.3 COMPROBAR LA CESTA DE LA COMPRA Y FINALIZAR EL PEDIDO

☑ La ventana **Cesta de la compra** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la cesta de la compra* [▶ *Página 216 - Standalone*].

1. En la ventana **Cesta de la compra**, compruebe si están incluidos los productos deseados.

2. Haga clic en el botón **Finalizar el pedido**.

▶ SICAT Suite fija el estado de los pedidos en **En preparación** y establece una conexión con el servidor SICAT a través de SICAT WebConnector.

▶ Si dispone de una conexión activa a Internet, las modificaciones en el pedido solo podrán efectuarse en el portal SICAT.

Continúe con una de las siguientes acciones:

■ *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 218 - Standalone*]

■ *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 222 - Standalone*]

35.4 FINALIZAR EL PEDIDO CON AYUDA DE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET



En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.

- ☑ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
 - ☑ El portal SICAT se ha abierto automáticamente en su navegador.
1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra los productos contenidos y los precios respectivos agrupados por paciente.
 2. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 219 - Standalone*].
 - ▶ SICAT Suite prepara los datos de pedido para la carga.
 - ▶ Tan pronto como se terminan los preparativos, SICAT WebConnector transfiere los datos de pedido al servidor SICAT a través de una conexión encriptada.
 - ▶ En la cesta de la compra, el estado del pedido pasa a **Cargando**.



SICAT Suite muestra el pedido hasta que se ha terminado de cargar. Esto se aplica también a los pedidos que se cargan en otro PC, si es que varios PC utilizan el archivador de historias clínicas activo. En la cesta de la compra puede pausar, reanudar y cancelar la carga de los pedidos que se han iniciado en el PC actual.



Si cierra la sesión de Windows durante la carga, SICAT WebConnector detiene el proceso. El software reanuda automáticamente la carga tras iniciar sesión otra vez.

35.5 REALIZAR LOS PASOS DE PEDIDO EN EL PORTAL SICAT

Después de realizar los pasos de pedido en SICAT Suite, se abre el portal SICAT en su navegador web estándar. En el portal SICAT puede modificar sus pedidos, seleccionar proveedores cualificados para la fabricación y ver los precios de los productos.

Para realizar los pasos de pedido en el portal SICAT, haga lo siguiente:

1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
2. Compruebe si están incluidos los productos deseados.
3. Si es necesario, elimine pacientes y, con ello, también todos los respectivos productos de la vista general de pedidos. Al finalizar el pedido, SICAT Suite adopta las modificaciones que se han realizado en el portal SICAT.
4. Compruebe si la dirección de facturación y la dirección de suministro son correctas. Modifíquela si es necesario.
5. Elija la forma de envío deseada.
6. Acepte las condiciones comerciales generales y envíe el pedido.



Puede eliminar pacientes y todas las férulas respectivas del portal SICAT seleccionando un paciente y haciendo clic en el botón para eliminar pacientes. Después, en la cesta de la compra volverá a tener acceso completo a la recopilación de productos.

35.6 SICAT WEBCONNECTOR

i El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 8 - Standalone*].

i En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.


Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, SICAT Suite transfiere los pedidos codificados y en segundo plano a través de SICAT WebConnector. SICAT Endo muestra el estado de las transferencias directamente en la cesta de la compra y puede pausar SICAT WebConnector. SICAT WebConnector reanuda la transferencia cuando se cierra SICAT Suite. Si la carga no se puede llevar a cabo de la forma deseada, puede abrir la interfaz de usuario de SICAT WebConnector.

ABRIR LA VENTANA "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- En el área de notificación de la barra de tareas, haga clic en el símbolo **SICAT Suite WebConnector**.

▶ Se abre la ventana **SICAT Suite WebConnector**:

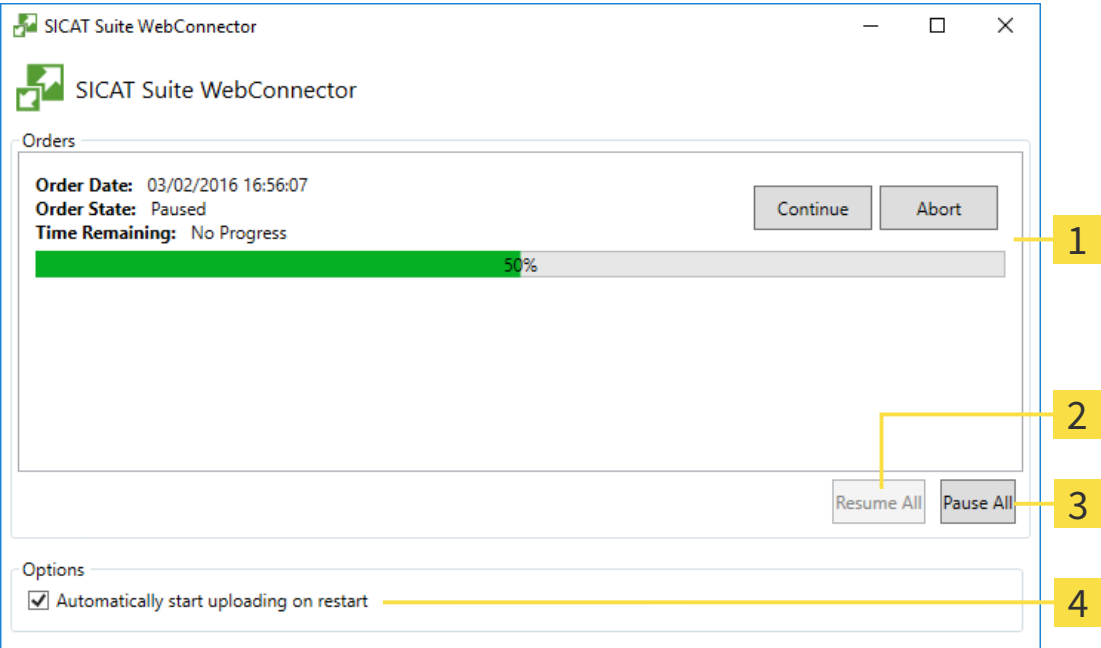

- 1** Lista **Pedidos**
- 2** Botón **Reanudar todos**
- 3** Botón **Detener todos**
- 4** Casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**

La lista **Pedidos** muestra la cola de espera de los pedidos.

INTERRUMPIR Y CONTINUAR CON LA CARGA

Puede cancelar el proceso de carga. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la conexión a Internet está sobrecargada. Los ajustes solamente se aplican a los procesos de carga en SICAT WebConnector. Los procesos de carga a través de navegador web no se ven afectados.

La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Detener todos**.
 - ▶ SICAT WebConnector interrumpe la carga de todos los pedidos.
2. Haga clic en el botón **Reanudar todos**.
 - ▶ SICAT WebConnector reanuda la carga de todos los pedidos.

DESACTIVAR LA REANUDACIÓN AUTOMÁTICA TRAS UN REINICIO

Puede impedir que SICAT WebConnector reanude automáticamente la carga después de reiniciar Windows.

La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

- Desactive la casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**.
- ▶ Cuando reinicie su PC, SICAT WebConnector ya no reanudará automáticamente la carga de sus pedidos.

35.7 FINALIZAR EL PEDIDO SIN UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite no puede establecer conexión al servidor de SICAT, SICAT Suite abre la ventana **Error al conectar con el servidor de SICAT**. La ventana le muestra una de las siguientes causas del problema:

- **No hay ninguna conexión a Internet disponible. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**
- **El portal SICAT no está disponible**
- **No está instalado el servicio "SICATWebConnector"**
- **No se ha iniciado el servicio "SICATWebConnector"**
- **Se ha producido un error desconocido. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**

Este capítulo tan solo muestra las capturas de pantalla en caso de que no tenga conexión a Internet.

En las causas encontrará los posibles pasos para solucionar el problema.

De manera alternativa a la solución de fallos, puede cargar un pedido a través de un navegador en otro PC con conexión a Internet activa. Para los pedidos mediante el navegador, SICAT Suite exporta todos los productos de la cesta de la compra a la vez y crea una subcarpeta por paciente. En cada subcarpeta hay un archivo XML con los datos para el pedido y una carpeta ZIP con los datos que SICAT necesita para la producción. En el portal SICAT puede cargar sucesivamente el archivo XML y la carpeta ZIP. La transferencia está encriptada.

Para finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:


- El PC en el que se ejecuta SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet.
- Una ventana muestra el siguiente mensaje: **Error al conectar con el servidor de SICAT**



1 Botón **Cargar desde otro equipo**

1. Haga clic en el botón **Cargar desde otro equipo**.

► Se abre la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**:

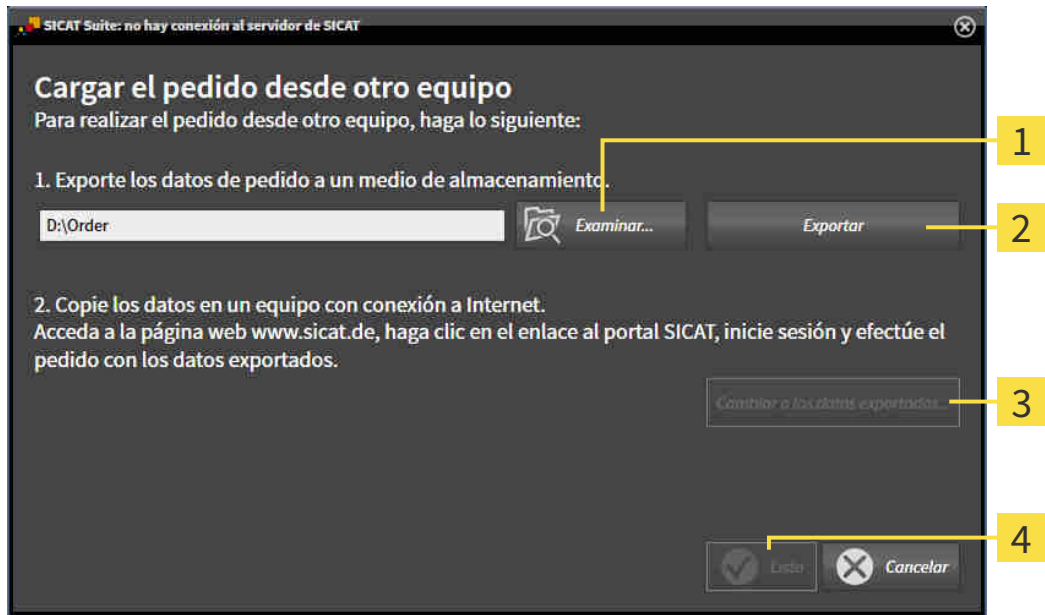

1 Botón **Examinar**


3 Botón **Cambiar a los datos exportados**

2 Botón **Exportar**

4 Botón **Listo**

2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
3. Elija un directorio que ya exista o cree uno nuevo y haga clic en **OK**. Tenga en cuenta que la ruta del directorio no puede tener más de 160 caracteres.
4. Haga clic en el botón **Exportar**.
 - SICAT Suite exporta, a la carpeta indicada, todos los datos necesarios para pedir el contenido de la cesta de la compra. Al hacerlo, SICAT Suite crea una subcarpeta para cada paciente.
5. Haga clic en el botón **Cambiar a los datos exportados**.

- ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows que muestra el directorio con los datos exportados:

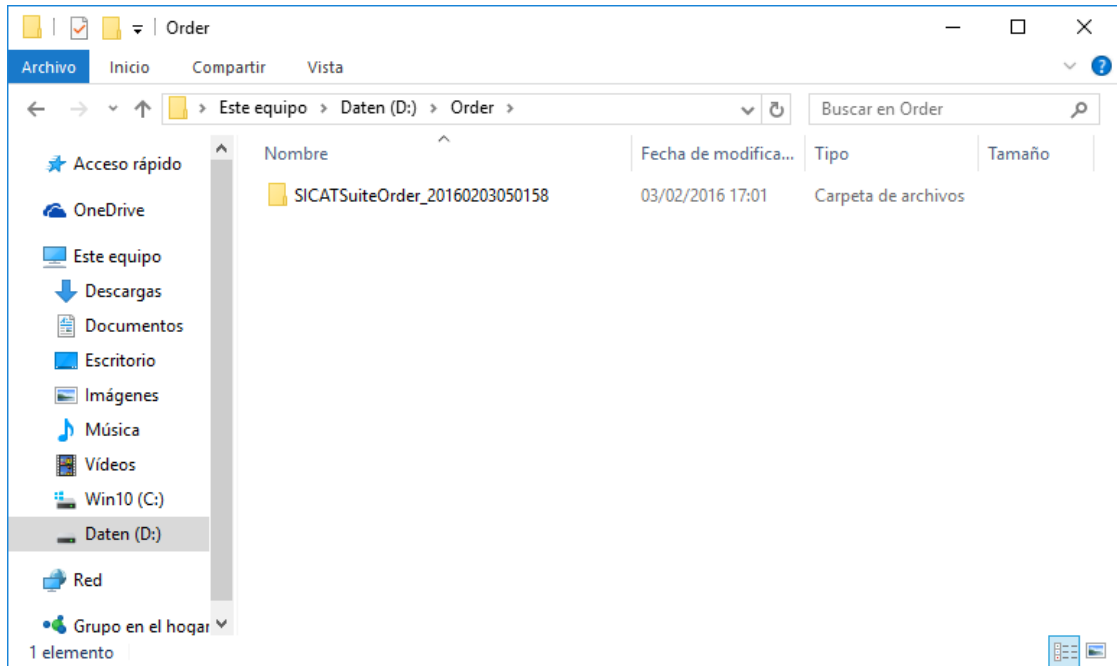

6. Copie la carpeta que contiene los datos de la férula deseada a un PC con una conexión activa a Internet utilizando, por ejemplo, una memoria extraíble USB.
7. En la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**, haga clic en **Listo**.
 - ▶ SICAT Suite cierra la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**.
 - ▶ SICAT Suite elimina de la cesta de la compra todos los productos contenidos en el pedido.
8. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.de>.
9. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - ▶ Se abrirá el portal SICAT.
10. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
11. Haga clic en el enlace para cargar el pedido.
12. Seleccione el pedido deseado en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo XML cuyo nombre empieza por **SICATSuiteOrder**.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra el paciente contenido, el respectivo producto y el precio.
13. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 219 - Standalone*].
14. Haga clic en el enlace para cargar los datos de planificación del producto.

15. Seleccione los datos del producto adecuados en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo ZIP que se encuentra en la misma carpeta que el archivo XML que se ha cargado antes y cuyo nombre empieza por **SICATSuiteExport**.
- ▶ Cuando haya realizado el pedido, su navegador transferirá el archivo con los datos del producto al servidor SICAT a través de una conexión a Internet encriptada.



SICAT Suite no elimina automáticamente los datos exportados. Al finalizar un proceso de pedido, por motivos de seguridad debería eliminar manualmente los datos exportados.

36 AJUSTES

Puede modificar o ver los ajustes generales en la ventana **Ajustes**. Después de hacer clic en el símbolo **Ajustes**, la barra de opciones situada en el lado izquierdo de la ventana **Ajustes** muestra las pestañas siguientes:

- **Generalidades** - Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 227 - Standalone*].
- **Sus archivadores de historias clínicas** - solo disponible en la versión independiente de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Archivadores de historias clínicas* [▶ *Página 52 - Standalone*].
- **Licencias** - Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 43 - Standalone*].
- **Consulta** - ver o modificar el logotipo y el texto informativo de su consulta, por ejemplo para la utilización en impresiones. Encontrará información sobre ello en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 231 - Standalone*].
- **Visualización** - modificar los ajustes de visualización generales. Encontrará información sobre ello en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 232 - Standalone*].

Si modifica ajustes, SICAT Endo adopta las modificaciones de inmediato y guarda los ajustes en su perfil de usuario.

36.1 UTILIZAR AJUSTES GENERALES


Para abrir los ajustes generales, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.
▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Generalidades**.
▶ Se abre la ventana **Generalidades**:

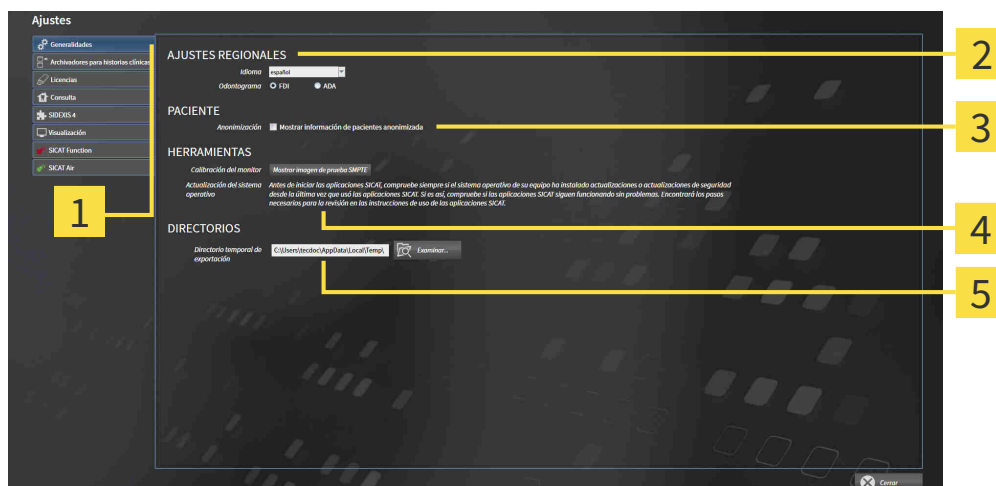

1 Pestaña **Generalidades**

4 Área **HERRAMIENTAS**

2 Área **AJUSTES REGIONALES**

5 Área **DIRECTORIOS**

3 Área **PACIENTE**

Puede modificar los siguientes ajustes:

- En el área **AJUSTES REGIONALES**, puede modificar el idioma de la interfaz de usuario en la lista **Idioma**.
- En el área **AJUSTES REGIONALES**, puede modificar el odontograma actual en **Odontograma**.
- En el área **PACIENTE**, puede modificar el estado de la casilla de comprobación **Mostrar información de pacientes anonimizada**. Si se ha activado la casilla de comprobación, SICAT Suite muestra los atributos de la historia clínica en la **Barra de exploración** como **Paciente** para **Apellidos**, **Anónimo** para **Nombre** y **01.01** con el año de nacimiento para **Fecha de nacimiento**. En la ventana **SICAT Suite Home**, SICAT Suite oculta la lista **Últimas historias clínicas**.
- En el área **DIRECTORIOS**, puede indicar una carpeta en el campo **Directorio temporal de exportación** en la que SICAT Suite guardará los datos de pedido. Debe tener acceso completo a esta carpeta.

Además de visualizar o modificar los ajustes generales, puede abrir la imagen de prueba SMPTE para calibrar su monitor:

- En **HERRAMIENTAS**, **Calibración del monitor**, haga clic en el botón **Mostrar imagen de prueba SMPTE** para calibrar el monitor. Encontrará información sobre ello en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [▶ [Página 229 - Standalone](#)].



Los odontogramas admitidos son FDI y ADA.

36.2 CALIBRACIÓN DEL MONITOR CON LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

PRECAUCIÓN


Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Cuatro propiedades principales determinan si su monitor es adecuado para mostrar datos en aplicaciones SICAT:

- Brillo
- Contraste
- Resolución espacial (linealidad)
- Distorsión (aliasing)

La imagen de prueba SMPTE es una imagen de referencia que le ayudará a comprobar las propiedades de su monitor:

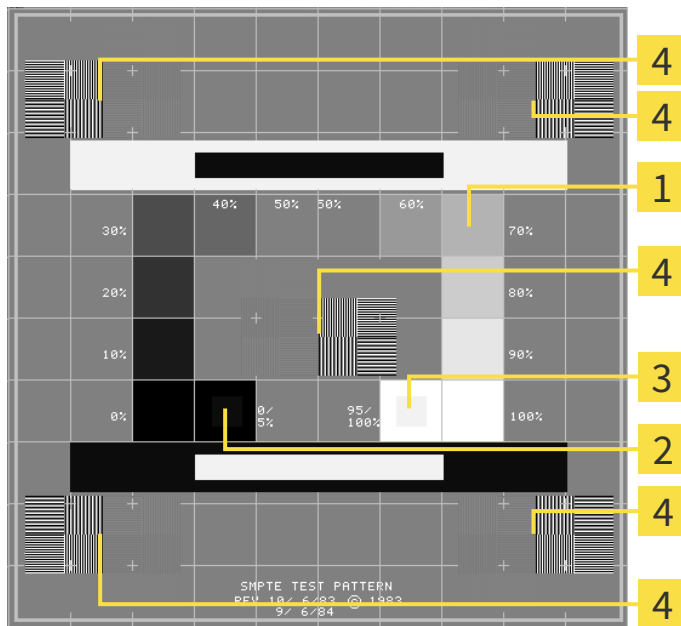

1 Cuadrados de niveles de gris

2 Cuadrado del 0%

3 Cuadrado del 100%

4 Cuadrados que contienen un patrón de barras con un alto contraste

COMPROBAR EL BRILLO Y EL CONTRASTE

En el centro de la imagen de prueba SMPTE, una serie de cuadrados muestran la gradación de los distintos niveles de gris desde el negro (0% de brillo) hasta el blanco (100% de brillo):

- El cuadrado del 0% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 0% y el 5%.
- El cuadrado del 100% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 95% y el 100%.

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- La imagen de prueba SMPTE ya está abierta.
 - Compruebe si en el cuadrado del 0% y en el del 100% puede ver la diferencia visual entre el cuadrado interior y el exterior. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.



Muchos monitores solamente pueden mostrar la diferencia de brillo en el cuadrado del 100% y no en el cuadrado del 0%. Puede reducir la luz ambiental para facilitar la diferenciación de los distintos niveles de brillo en el cuadrado del 0%.

COMPROBAR LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y LA DISTORSIÓN

En las esquinas y en el centro de la imagen de prueba SMPTE, 6 cuadrados muestran un patrón de barras con un alto contraste. En relación con la resolución espacial y la distorsión, debería poder distinguir entre líneas horizontales y verticales con distintas anchuras y que se alternan en blanco y negro:

- De grueso a fino (6 píxeles, 4 píxeles, 2 píxeles)
- Horizontal y vertical

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- En los 6 cuadrados que muestran un patrón de barras con alto contraste, compruebe si puede diferenciar todas las líneas. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.

CERRAR LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

Para cerrar la imagen de prueba SMPTE, haga lo siguiente:

- Pulse la tecla **ESC**.
- ▶ La imagen de prueba SMPTE se cierra.

36.3 UTILIZAR INFORMACIÓN DE LA CONSULTA

Las aplicaciones de SICAT Suite utilizan la información aquí mostrada para personalizar impresiones o archivos PDF.

Para abrir la información de la consulta, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.

▶ Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Consulta**.

▶ Se abre la ventana **CONSULTA**:

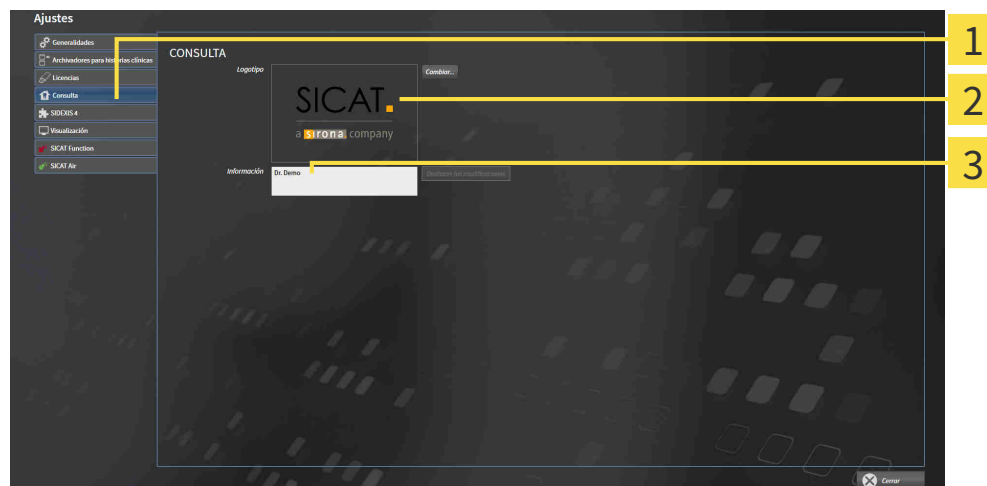

1 Pestaña **Consulta**

2 Área **Logotipo**

3 Área **Información**

Puede modificar los siguientes ajustes:

- En el área **Logotipo** puede especificar el logotipo de su consulta. Con el botón **Cambiar** puede seleccionar el logotipo de su consulta. SICAT Suite copia el archivo indicado a su directorio de usuario de SICAT Suite.
- En el área **Información** puede introducir un texto que identifique a su consulta, por ejemplo el nombre y la dirección. Puede ampliar la cantidad de líneas a un máximo de cinco pulsando la tecla **Intro**. Puede deshacer las modificaciones en el texto informativo haciendo clic en el botón **Deshacer las modificaciones**.

36.4 MODIFICAR LOS AJUSTES DE VISUALIZACIÓN

PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.

PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Los ajustes de visualización determinan la visualización del volumen, de los objetos de diagnóstico y de los objetos planificados en todas las aplicaciones SICAT.

Para abrir la ventana **Visualización**, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el símbolo **Ajustes**.

► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Visualización**.

► Se abre la ventana **Visualización**:

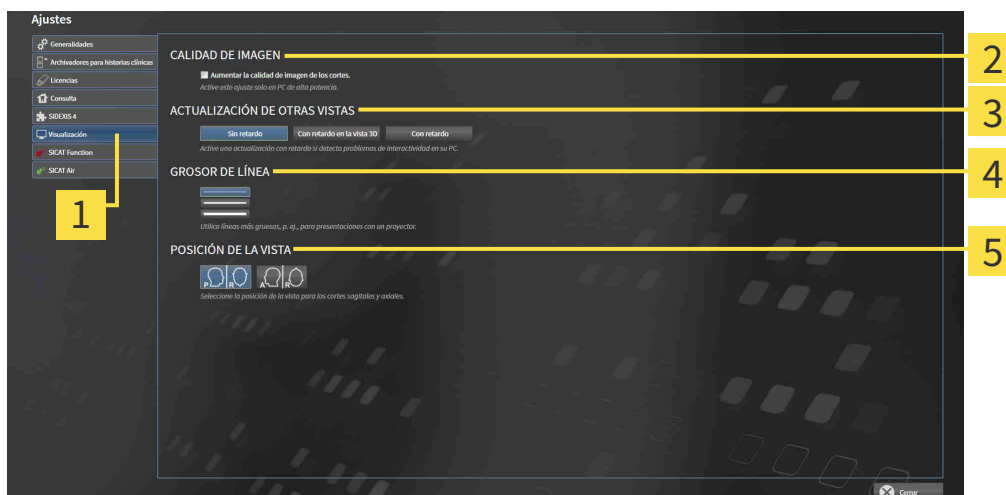

1 Pestaña **Visualización**

2 Área **CALIDAD DE IMAGEN**

3 Área **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS**

4 Área **GROSOR DE LÍNEA**

5 Área **POSICIÓN DE LA VISTA**

Los ajustes son:

- **Aumentar la calidad de imagen de los cortes** - mejora la calidad de la visualización de cortes, ya que el software promedia cortes adyacentes. Active este ajuste solo en PC de alta potencia.
- **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS** - la actualización con retardo mejora la interactividad de la vista activa, pero a costa de un retardo en la actualización de otras vistas. Active la actualización con retardo solo si detecta problemas de interactividad en su PC.
- **GROSOR DE LÍNEA** - modifica el grosor de las líneas. Las líneas más gruesas son útiles para las presentaciones con proyector.
- **POSICIÓN DE LA VISTA** - cambia la posición de la vista de corte **Axial** y de la vista de corte **Sagital**.

37 SERVICIO DE ASISTENCIA

SICAT ofrece las siguientes opciones de asistencia:

- Documentos PDF
- Contacto
- Información sobre el SICAT Suite y las aplicaciones SICAT instalados

Continúe con la siguiente acción:

- *Abrir opciones de asistencia* [▶ *Página 235 - Standalone*]



37.1 ABRIR OPCIONES DE ASISTENCIA



Puede abrir la ventana **Servicio de asistencia** haciendo clic en el símbolo **Servicio de asistencia** de la **Barra de exploración** o pulsando la tecla F1.

La ventana **Servicio de asistencia** de SICAT Suite se compone de las siguientes pestañas:



- **Instrucciones de utilización** - Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 42 - Standalone*].




- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Información de contacto y herramientas de ayuda* [▶ *Página 236 - Standalone*].



- **Información** - Encontrará información sobre ello en *Información* [▶ *Página 237 - Standalone*].

37.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO Y HERRAMIENTAS DE AYUDA

La ventana **Servicio de asistencia** contiene toda la información y todas las herramientas relevantes para que el servicio de asistencia de SICAT pueda ayudarle:

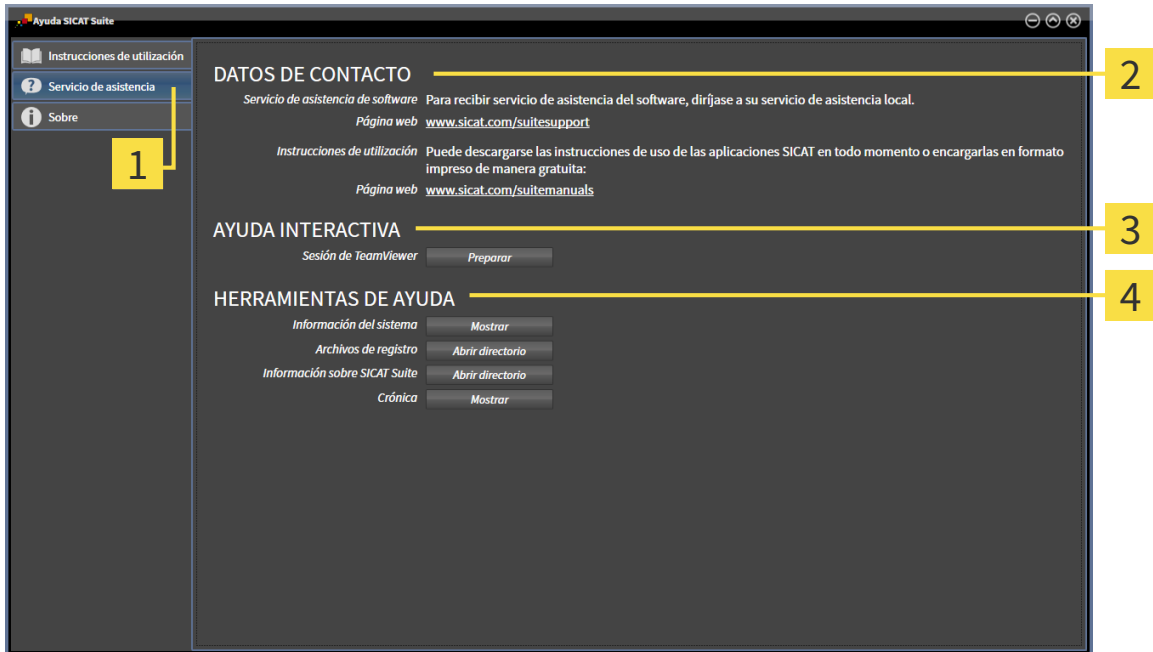

1 Pestaña **Servicio de asistencia**

3 Área **AYUDA INTERACTIVA**

2 Área **DATOS DE CONTACTO**

4 Área **HERRAMIENTAS DE AYUDA**

En el área **DATOS DE CONTACTO** se indica dónde encontrar instrucciones de utilización.

En el área **AYUDA INTERACTIVA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Preparar** del área **Sesión de TeamViewer**, SICAT Endo abre una sesión de TeamViewer.


TeamViewer es un software que permite controlar comandos del ratón y del teclado a distancia y transferir el contenido de la pantalla de un PC a través de una conexión activa a Internet. TeamViewer establece una conexión solamente con su autorización expresa. Para ello, transmite una ID de TeamViewer y una contraseña al servicio de asistencia de SICAT. Esto permitirá que el servicio de asistencia de SICAT le ayude directamente in situ.

En el área **HERRAMIENTAS DE AYUDA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Mostrar** del área **Información del sistema**, SICAT Endo abre la información de sistema del sistema operativo.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Archivos de registro**, SICAT Endo abre el directorio de registro de SICAT Suite en una ventana del explorador de archivos de Windows.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Información sobre SICAT Suite**, SICAT Endo exporta información sobre la instalación actual a un archivo de texto.
- Después de hacer clic en el área **Información sobre SICAT Suite** en el botón **Mostrar notificaciones**, SICAT Endo muestra la ventana de notificaciones.

37.3 INFORMACIÓN

La ventana **Información** muestra información sobre SICAT Suite y todas las aplicaciones SICAT instaladas en varias pestañas:

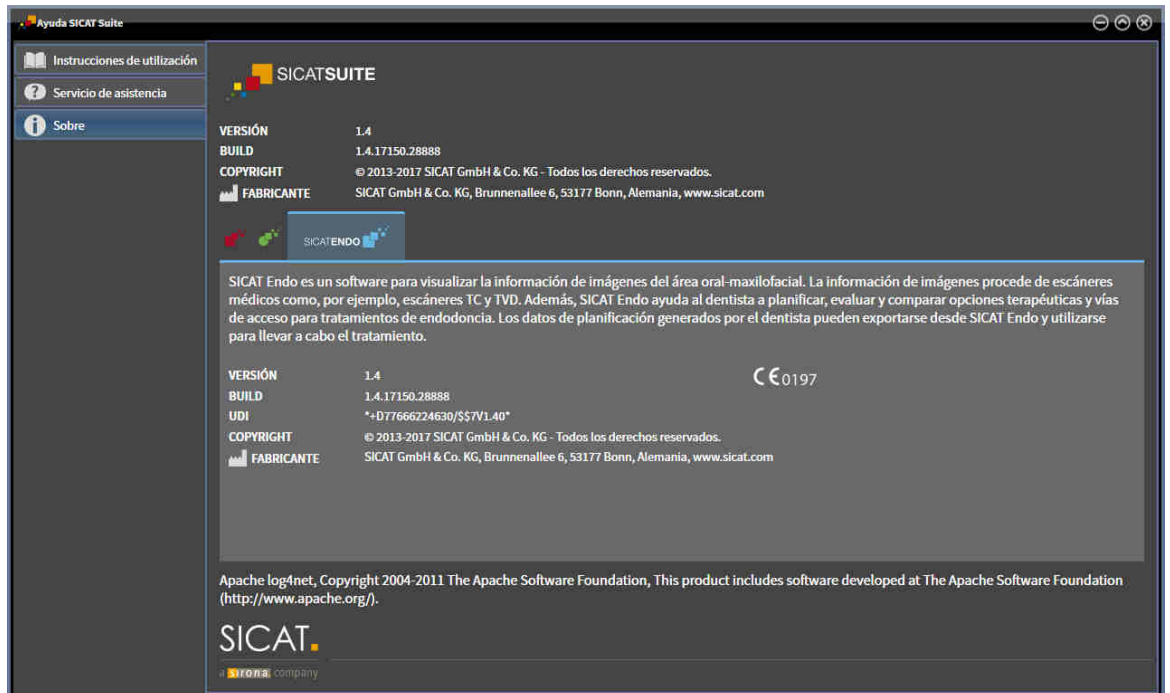

38 ABRIR DATOS PROTEGIDOS CONTRA ESCRITURA

Puede abrir datos protegidos contra escritura.

El estado de la licencia y la disponibilidad de un archivador de historias clínicas determinan qué tipos de datos pueden verse en la versión independiente sin poder realizar ni guardar cambios.

TIPO DE LICENCIA SICAT ENDO	¿ARCHIVADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ACTIVO?	¿ES POSIBLE VISUALIZAR SIN REALIZAR CAMBIOS?
Nunca	No relevante	No
Viewer	No relevante	Para datos de SICAT
Versión completa	No	Sí
Versión completa	Sí	No


Solo puede ver los datos DICOM si ha activado una licencia completa de SICAT Endo y no hay ningún archivador de historias clínicas activo.

Para ver datos, sin poder realizar ni guardar cambios, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Ver datos** de la **Barra de exploración**.

► Se abre la ventana **Ver datos**:

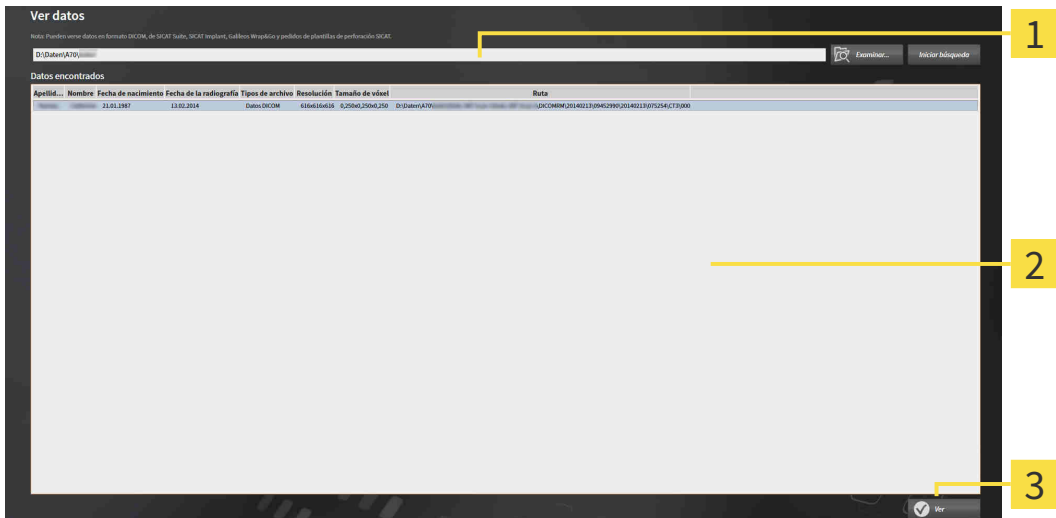

1 Campo **¿Dónde se encuentran los datos**

2 Lista **Datos encontrados**

3 Botón **Ver**



2. Haga clic en el botón **Examinar**.

► Se abre la ventana **Seleccionar archivo o directorio**.

3. Seleccione el archivo o la carpeta con los datos que desea consultar en la ventana **Seleccionar archivo o directorio** y haga clic en **OK**.

- ▶ SICAT Suite cierra la ventana **Seleccionar archivo o directorio** y transfiere la ruta del archivo o carpeta seleccionados al campo **¿Dónde se encuentran los datos**.
 - ▶ Si ha seleccionado un archivo compatible, SICAT Suite muestra los contenidos del archivo en la lista **Datos encontrados**.
 - ▶ Si ha seleccionado una carpeta, SICAT Suite examina la carpeta y todas las subcarpetas. En la lista **Datos encontrados**, SICAT Suite muestra los archivos compatibles contenidos en una de las carpetas examinadas.
4. Seleccione la radiografía 3D deseada o el proyecto de planificación deseado de la lista **Datos encontrados** y haga clic en el botón **Ver datos**.
- ▶ SICAT Suite crea una historia clínica temporal que contiene radiografías 3D y proyectos de planificación, y la activa.
5. Continúe con *Trabajar con historias clínicas activas* [▶ *Página 75 - Standalone*].

También puede arrastrar un archivo o una carpeta compatible mediante «arrastrar y soltar» en el campo **¿Dónde se encuentran los datos** para seleccionar datos.



Si sigue el procedimiento descrito, la búsqueda se iniciará automáticamente. Puede cancelar la búsqueda haciendo clic en el botón **Detener búsqueda**. Si introduce manualmente una ruta de un archivo o una carpeta en el campo **¿Dónde se encuentran los datos**, debe hacer clic en el botón **Iniciar búsqueda**. Esto también puede ser útil para reiniciar una búsqueda si el contenido de la carpeta ha cambiado o usted ha finalizado la búsqueda accidentalmente.



Deben cumplirse las siguientes condiciones para que pueda adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica:

- Ha activado una licencia con la que puede abrir radiografías 3D o estudios de SICAT Endo. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 43 - Standalone*].
- Para la radiografía 3D, no hay objetos que pudieran verse afectados por una modificación de la alineación del volumen o la curva panorámica en ningún estudio de solo lectura correspondiente de SICAT Function o cualquier otra aplicación de SICAT.

Si no se dan las condiciones, SICAT Endo desactiva en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** los botones y elementos de control que puede utilizar para realizar cambios en la alineación del volumen o la curva panorámica.

39 CERRAR SICAT ENDO

Para cerrar SICAT Endo, haga lo siguiente:



- En el área de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ SICAT Suite guarda la historia clínica activa del paciente.
- ▶ SICAT Suite cierra todas las aplicaciones SICAT.
- ▶ SICAT Suite cierra la historia clínica activa del paciente.

40 CERRAR SICAT SUITE



- En la esquina superior derecha de SICAT Suite, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ Si se está ejecutando la versión completa de SICAT Suite, esta dispone de derechos de escritura y está abierto un estudio, SICAT Suite guarda todos los proyectos de planificación.
- ▶ SICAT Suite se cierra.

41 MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO



Al situar el puntero del ratón sobre determinadas funciones, SICAT Endo muestra junto al nombre de la función el método abreviado de teclado entre paréntesis.

En todas las aplicaciones SICAT están disponibles los siguientes métodos abreviados de teclado:

MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO	DESCRIPCIÓN
A	Añadir medición de ángulo
D	Añadir medición de distancia
F	Enfocar un objeto activo
Ctrl + C	Copiar el contenido de la vista activa en el portapapeles
Ctrl + Z	Deshacer la última acción de objeto
Ctrl + Y	Volver a realizar la última acción de objeto deshecha
Supr	Eliminar el objeto activo o grupo de objetos activo
ESC	Cancelar la acción actual (por ejemplo, añadir una medición)
F1	Abrir la ventana Servicio de asistencia , abrir las instrucciones de utilización con la aplicación de SICAT activa

42 DESINSTALAR SICAT SUITE



El programa de desinstalación de SICAT Suite conserva las licencias activas en su PC. Por esa razón, antes de la desinstalación el programa de instalación de SICAT Suite avisa de que no elimina automáticamente las licencias. Si ya no desea utilizar SICAT Suite en ese PC, desactive las licencias antes de la desinstalación. Encontrará más información al respecto en *Devolver licencias al pool de licencias* [▶ *Página 50 - Standalone*].



Antes de desinstalar SICAT Suite, asegúrese de que SICAT WebConnector ha terminado de cargar todos los pedidos, ya que el programa de desinstalación cierra automáticamente SICAT WebConnector. Encontrará más información al respecto en *SICAT WebConnector* [▶ *Página 220 - Standalone*].

Para desinstalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

- SICAT WebConnector ha cargado correctamente todos los pedidos.
- 1. En el **Panel de control** de Windows, haga clic en **Programas y funciones**.
 - ▶ Se abre la ventana **Programas y funciones**.
- 2. En la lista, elija la opción **SICAT Suite**, que contiene la versión de SICAT Suite.
- 3. Haga clic en el botón **Desinstalar**.
 - ▶ El programa de desinstalación se inicia y se abre la ventana **PROGRESO**:



- Una vez terminada la desinstalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**:



4. Haga clic en el botón **Finalizar**.

- El programa de desinstalación de SICAT Suite se cierra.



Para abrir el programa de desinstalación de SICAT Suite, puede iniciar también el programa de instalación de SICAT Suite en un PC en el que ya está instalado SICAT Suite.



El programa de desinstalación de SICAT Suite abre los programas de desinstalación de algunos requisitos de software que se han instalado junto con SICAT Suite. Si otras aplicaciones instaladas siguen necesitando los requisitos de software, estos se conservan.

43 NOTAS SOBRE SEGURIDAD

RADIOGRAFÍAS 3D



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.



PRECAUCIÓN

El uso de otros datos que no sean las radiografías 3D como fuentes de información para la planificación de una terapia basada en las mediciones podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice las radiografías 3D para el diagnóstico y la planificación si utiliza la funcionalidad de medición.

RADIOGRAFÍAS INTRAORALES



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas para el registro de radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.


1. Utilice únicamente radiografías 3D que solo contengan pocos artefactos o ninguno.
2. Utilice solo radiografías 3D que cuenten con una resolución lo suficientemente alta.




PRECAUCIÓN

Las radiografías intraorales que no coincidan con el paciente ni con la radiografía 3D o cuyo momento de adquisición diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que, en una radiografía intraoral, coincidan el paciente y la radiografía 3D, y de que el momento de adquisición no diste demasiado del momento de adquisición de la radiografía 3D.

-  **PRECAUCIÓN** **Una orientación incorrecta de las radiografías intraorales en relación con las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
1. Compruebe que las radiografías intraorales registradas estén correctamente adaptadas a la radiografía 3D.
 2. En caso necesario, gire las radiografías intraorales para orientarlas correctamente.
-  **PRECAUCIÓN** **Las radiografías intraorales que no se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Compruebe que las radiografías intraorales se hayan registrado correctamente con las radiografías 3D.
-  **PRECAUCIÓN** **Los dispositivos para radiografías intraorales no aprobados como productos médicos podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Asegúrese de utilizar para las radiografías intraorales únicamente dispositivos aprobados como productos médicos.
-  **PRECAUCIÓN** **La integridad o calidad insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Compruebe la integridad y la calidad de las radiografías intraorales importadas.
-  **PRECAUCIÓN** **Una calidad insuficiente de las radiografías intraorales o las radiografías 3D podrían conllevar que el mecanismo de registro de las radiografías intraorales fallara.**
- Utilice únicamente radiografías intraorales y radiografías 3D que permitan un registro correcto.
-  **PRECAUCIÓN** **La calidad y la precisión insuficientes de las radiografías intraorales pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Utilice únicamente radiografías intraorales que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.
-  **PRECAUCIÓN** **Una posición u orientación incorrecta de las radiografías intraorales podrían conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Después del registro, compruebe la correcta posición y orientación de las radiografías intraorales con los dientes en la radiografía 3D.

CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN

-  **PRECAUCIÓN** **Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
- Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.


PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

GESTIÓN DE DATOS


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.


PRECAUCIÓN

La eliminación de datos originales podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

No elimine los datos originales tras la importación.


PRECAUCIÓN

La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.


PRECAUCIÓN

Si elimina historias clínicas, todas las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos también se eliminarán.

Elimine historias clínicas únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos.


PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.


PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

SEGURIDAD



Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.



Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.



Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE



Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.



Los medios de instalación dañados podrían hacer que la instalación fallara.

Trate los medios de instalación con cuidado y almacénelos de forma adecuada.



Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.



Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.



Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

PEDIDOS



El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.

Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.



Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.





1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

IMPRESIONES ÓPTICAS



El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.

-  **PRECAUCIÓN** **Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.
-  **PRECAUCIÓN** **Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.
-  **PRECAUCIÓN** **La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.
-  **PRECAUCIÓN** **La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.
-  **PRECAUCIÓN** **Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.**
Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.
-  **PRECAUCIÓN** **La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.
-  **PRECAUCIÓN** **Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.**
Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.

RED



PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.



PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.



PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.

ODONTOGRAMA



PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta de los números de dientes podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe que coincidan los números de dientes seleccionados y los números de dientes anatómicos reales.

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN



PRECAUCIÓN

Una profundidad de perforación incorrecta puede conllevar un tratamiento incorrecto.

Asegúrese de que la profundidad de perforación y el taladro seleccionado coincidan.

OBJETOS PLANIFICADOS



PRECAUCIÓN

El uso de la vista 3D para visualizar mediciones y objetos de planificación podría conllevar un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice la vista 3D únicamente de orientación y como fuente de información adicional.

44 PRECISIÓN

La siguiente tabla muestra los valores de precisión en todas las aplicaciones SICAT:

Exactitud de la medida para las mediciones de distancias	< 100 µm
Exactitud de la medida para las mediciones de ángulos	< 1 grado
Precisión de la visualización	< 20 µm

GLOSARIO

ADA

American Dental Association (Asociación Dental Americana)

Aplicación

Las aplicaciones SICAT son programas que pertenecen a SICAT Suite.

Archivador de historias clínicas

Un archivador de historias clínicas contiene historias clínicas. SICAT Suite guarda archivadores de historias clínicas en carpetas en un sistema de archivos local o un sistema de archivos en red.

Barra de exploración

La barra de exploración situada en la parte superior de SICAT Suite contiene los símbolos más importantes de SICAT Suite. Si una historia clínica está activa, la barra de exploración permite cambiar entre la historia clínica y diferentes aplicaciones.

Canal de perforación

Tomando como base la vía planificada para la perforación del EndoLine, que puede representarse gráficamente y editarse en el software.

CPR

Curved Planar Reformation, proceso de reconstrucción bidimensional de imágenes de radiografías 3D que se aplica para facilitar la representación de estructuras complejas.

EndoLine

Un EndoLine es una línea de medición multifuncional que sirve para marcar el canal de la raíz a tratar y para localizar la punta de la raíz.

Estudio

Un estudio consta de una radiografía 3D y el correspondiente proyecto de planificación.

FDI

Fédération Dentaire Internationale, Federación Dental Internacional

Foco

Círculo destacado en una sección de una imagen para comprobar la superposición de la radiografía intraoral y la proyección en 3D en el marco del registro de radiografías intraorales.

Historia clínica

Una historia clínica contiene todas las radiografías 3D y proyectos de planificación relativos a un determinado paciente. SICAT Suite guarda las historias clínicas en archivadores de historias clínicas.

Impresiones ópticas

Una impresión óptica es el resultado de una adquisición superficial 3D de dientes, materiales de impresión o modelos de yeso.

Marco

En la vista 3D, los marcos muestran las posiciones de las vistas de corte 2D.

Portal SICAT

El portal SICAT es una página de Internet en la que puede pedir, entre otros elementos, férulas a SICAT.

Proyecto de planificación

Un proyecto de planificación se compone de datos de planificación de una aplicación SICAT basados en una radiografía 3D.

Radiografía 3D

Una radiografía 3D es una radiografía volumétrica.

Radiografía intraoral

Una radiografía intraoral es una radiografía 2D de dientes concretos que se toma con ayuda de una película dental detrás del diente y una fuente de rayos X fuera de la boca, y se caracteriza por una alta precisión de los detalles.

Registro

Alineación espacial

Retículos

Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte.

SIXD

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (sociedad de ingenieros cinematográficos y de televisión)

SSI

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

STL

Surface Tessellation Language, formato de archivo estándar para intercambiar datos de malla que pueden contener, por ejemplo, impresiones ópticas.

Ventana de notificación

La ventana de notificación muestra, en el margen inferior derecho de la pantalla, mensajes sobre procesos terminados.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Abrir datos protegidos contra escritura	238
Ajustes	226
Modificar los ajustes de visualización	232
Visualizar o modificar información de la consulta	231
Visualizar o modificar los ajustes generales.	227
Alineación de volumen	132
Ajustar	134
Archivadores de historias clínicas	53
Abrir la ventana "Archivadores de historias clínicas"	54
Activar otro archivador de historias clínicas	57
Añadir	55
Eliminar	59
Área de trabajo de radiografías intraorales	
Informaciones generales	103
Área panorámica	133
Ajustar	139
Áreas de trabajo	100
Ajustar	105
Cambiar	104
Crear capturas de pantalla	106
Panorámica	102
Radiografía intraoral	103
Restablecer	105
Asistente de EndoLine	169
Canal de perforación	169
Colocar EndoLines	180
EndoLine	169
EndoView	175
Orientar previamente la región dental	178
Planificar canales de perforación	189
Seleccionar diente	177
Vistas	170
Asistente de registro	158
Poner máscaras en áreas	167
Posicionar previamente la radiografía intraoral	159
Registrar la radiografía intraoral	161

B

Barra de herramientas del flujo de trabajo	89
--	----

C

Calibración del monitor	229
Cambiar	
Aplicaciones	41
Cambiar de aplicación	41
Canales de perforación	
Bloquear	189
Desbloquear	189

Eliminar	189
Canjear códigos	51
Capturas de pantalla	
Crear a partir de vistas	121
Crear para impreso	204
Realizar a partir de áreas de trabajo	106
Cerrar	241
Cerrar SICAT Endo	240
Cesta de la compra	
Abrir	216
Colocar EndoLines	180
Utilizar botón del ratón	180

D

Desinstalación	243
----------------	-----

E

EndoLine	
Ajustar color y texto	182
Añadir puntos de control	183
Borrar puntos de control	183
Desplazar puntos de control	183
Editar	180
EndoView	175
Ajustar	180
Girar	176
Estudios de SICAT Endo	
Versión independiente	35, 81
Exportación de datos	208
Abrir la ventana "Transferir datos"	209
Exportar datos	210

F

Flujo de trabajo	30
------------------	----

H

Historias clínicas	70
Abrir desde la vista general de historias clínicas	78
Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"	71
Activar	74
Búsqueda	72
Clasificar	72
Eliminar	84
Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación	86
Modificar atributos	77
Trabajar con historias clínicas activas	75

I			
Idiomas	15		
Imagen de prueba SMPTE	229		
Imágenes y capturas de pantalla para impresos			
Ajustar herramientas de dibujo	203		
Crear capturas de pantalla	204		
Dibujar círculos	203		
Dibujar flechas	202		
Importación de datos	60		
Ajustes de importación	65		
Añadir a una historia clínica existente	67		
Asignar a nueva historia clínica	66		
Seleccionar datos	63		
Importación en STL	149		
Importar			
Radiografías intraorales	155		
Impresiones ópticas	142		
Importación en STL	149		
Importar y registrar	144		
Reutilizar a partir de otras aplicaciones SICAT	150		
Impresos			
Crear capturas de pantalla	204		
Preparar	205		
Producir	207		
Indicaciones	6		
Información de seguridad	10		
Cualificación de los usuarios	12		
Niveles de peligro	11		
Informar al paciente	201		
Instalación	17		
Desinstalación	243		
Instrucciones de utilización			
Abrir como ayuda online	42		
Símbolos y estilos	13		
Vista general	14		
Interfaz de usuario			
SICAT Endo	88		
SICAT Suite	37		
Ventana SICAT Suite Home	39		
L			
Licencias	43		
Activar automáticamente	46		
Activar manualmente	48		
Canjear códigos	51		
Devolver al pool de licencias	50		
Mostrar	45		
M			
Mediciones			
Añadir mediciones de ángulos	197		
Añadir mediciones de distancias	196		
Desplazar	199		
Desplazar lecturas	200		
		Desplazar puntos de medición	199
		Vista general	195
		Métodos abreviados de teclado	242
		O	
		Objetos	
		Activar objetos y grupos de objetos	93
		Barra de herramientas del objeto	95
		Barra de objetos	92
		Contraer y expandir grupos de objetos	93
		Deshacer y rehacer	95
		Eliminar	95
		Enfocar	95
		Mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos	94
		Objetos de SICAT Endo	96
		Orientar previamente la región dental	178
		P	
		Particularidades de esta versión	26
		Pasos del flujo de trabajo	
		Preparar	89
		Pedido	211
		Carga automática tras un reinicio	221
		Colocar plantilla de perforación en la cesta de la compra	212
		Comprobar la cesta de la compra	217
		Interrumpir y continuar con la carga	221
		Portal SICAT	219
		Transferencia de datos a través de otro PC	222
		Transferencia de datos en segundo plano	218
		Planificar canales de perforación	189
		Poner máscaras en áreas	167
		Portal SICAT	219
		Posicionar previamente la radiografía intraoral	159
		Primeros pasos	30
		R	
		Radiografía intraoral	
		Asistente de registro	158
		Posicionar previamente	159
		Registrar	161
		Radiografías intraorales	153
		Asignar dientes	155
		Importar	155
		Número de diente	155
		Sensores de radiografías intraorales compatibles	154
		Registrar la radiografía intraoral	161
		Adaptar la orientación previa	164
		Poner máscaras en áreas	167
		Requisitos del sistema	8
		S	
		Seleccionar diente	177

Sensores de radiografías intraorales compatibles	154
Servicio de asistencia	234
Abrir ayuda	42
Abrir la ventana de asistencia	235
Contacto	236
Herramientas	236
Información de producto	237
SICAT Endo	
Interfaz de usuario	88
SICAT Suite	
Cerrar	241
Iniciar	33
Interfaz de usuario	37
SICAT WebConnector	220

U

Uso previsto	6
--------------	---

V

Valores de gris	128
Ajustar	130
Ventana de exploración	101
Ventana SICAT Suite Home	39
Versión independiente	
Estudios de SICAT Endo	35, 81
Versiones	
Diferencias	26
Vista 3D	122
Cambiar el modo de detalle	127
Cambiar modo de visualización	124
Configurar	125
Modificar la posición	123
Vista general de SICAT Suite	15
Vistas	107
Aplicar el zoom	115
Asistente de EndoLine	170
Barra de herramientas de la vista	108
Brillo y contraste	113
Cambiar	110
Crear capturas de pantalla	121
Desplazar la ventana de exploración	118
Desplazar secciones	115
Desplazarse	116
EndoView	175
Maximizar y restablecer	112
Ocultar y mostrar la ventana de exploración	119
Restablecer	120
Retículos y marcos	117

EXPLICACIÓN SOBRE LAS IDENTIFICACIONES



- ¡Atención! Observe la documentación de acompañamiento.



- Observe las instrucciones de utilización.



- Fabricante



- Código de lote

Ejemplo de un código de lote:

1020130921

1 2 3 4

- | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|
| 1 | Versión de producto en formato AB (10 significa V1.0) | 3 | Mes de fabricación |
| 2 | Año de fabricación | 4 | Día de fabricación |

FECHA: 2017-12-19

CONTACTO



FABRICANTE

SICAT GMBH & CO. KG

BRUNNENALLEE 6

53177 BONN, ALEMANIA

WWW.SICAT.COM

CE0197

SERVICIO DE ASISTENCIA LOCAL

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT

TEL.: +49 6251 161670

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia total o parcial de estas instrucciones de utilización o su traducción sin la autorización por escrito de SICAT.

En el momento de su publicación, la información de este documento era correcta, pero puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

SICAT.

a **Sirona** company