

SICAT FUNCTION VERSION 1.4

Notice d'instruction | Français

RÉDACTION DES INSTRUCTIONS DE SERVICE

Ce document comprend trois variantes différentes des instructions de service SICAT Function:

- Une variante pour SICAT Function en tant que module SIDEXIS 4
- Une variante pour SICAT Function en tant que plug-in SIDEXIS XG
- Une variante pour SICAT Function en tant que version standalone

Les différentes instructions de service contiennent toutes les informations dont vous avez besoin pour une variante déterminée. Si, par exemple, vous utilisez exclusivement SICAT Function en tant que module SIDEXIS 4, vous devez lire uniquement la partie correspondante des instructions de service.

Les seules exceptions sont l'explication des marquages et le verso avec les données sur le fabricant et l'assistance ainsi que des numéros d'article des instructions de service. Ces informations se trouvent à la fin de l'ensemble du document.



SICAT FUNCTION *VERSION 1.4*

Notice d'instruction | Français | SIDEXIS 4

TABLE DES MATIÈRES - SIDEXIS 4

1	Utilisation conforme	8
2	Historique des versions	9
3	Configuration système requise	10
4	Informations relatives à la sécurité	12
4.1	Définition des niveaux de danger	13
4.2	Qualification des opérateurs	14
5	Symboles et mises en relief utilisés	15
6	Vue d'ensemble de la notice d'instruction	16
7	Aperçu général de SICAT Suite	17
8	Installer SICAT Suite	19
9	Effectuez les étapes d'essai après la mise à jour du système d'exploitation	25
10	Actualiser ou réparer SICAT Suite	31
11	Particularités dans cette version	32
12	Flux de travail standard de SICAT Function	35
13	Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4	39
14	Études SICAT Function dans SIDEXIS 4	41
15	Démarrer SICAT Suite	43
16	Interface utilisateur de SICAT Suite	45
17	Commuter entre les applications SICAT	46
18	Ouvrir les instructions de service	47
19	Licences	48
19.1	Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"	50
19.2	Activer des licences via une connexion Internet active	51
19.3	Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active	53
19.4	Restituer des licences au pool de licences	55
19.5	Utiliser des codes de bon d'échange	57
20	Interface utilisateur de SICAT Function	58
20.1	Barre d'outils de flux de travail	59
20.2	Barre d'objets	61
20.3	Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets	62
20.4	Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet	64
20.5	Objets de SICAT Function	65
21	Espaces de travail	67
21.1	Vue d'ensemble de l'espace de travail Panorama	68
21.2	Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ	70

21.3	Vue d'ensemble de l'espace de travail MPR/Radiologie	72
21.4	Changer d'espace de travail actif	73
21.5	Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail	74
21.6	Créer des captures d'écran d'espaces de travail	75
22	Vues	76
22.1	Adaptation des vues	77
22.2	Changer de vue active	79
22.3	Maximiser et restaurer les vues	80
22.4	Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D	81
22.5	Zoomer les vues et déplacer des extraits	83
22.6	Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D	84
22.7	Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres	85
22.8	Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen	86
22.9	Réinitialiser les vues	88
22.10	Créer des captures d'écran de vues	89
23	Adaptation de la vue 3D	90
23.1	Modifier le sens de vision de la vue 3D	91
23.2	Types de représentation de la vue 3D	92
23.3	Commuter le type de représentation de la vue 3D	95
23.4	Configurer le type de représentation actif de la vue 3D	96
23.5	Déplacer l'extrait	98
24	Orientation du volume et zone panoramique	100
24.1	Adapter l'orientation du volume	103
24.2	Adapter la zone panoramique	108
25	Données de mouvement	111
25.1	Appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles	112
25.2	Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés	113
26	Segmentation	118
26.1	Segmenter la mandibule	119
26.2	Segmenter les fosses	121
27	Empreintes optiques	124
27.1	Importer et recalcr les empreintes optiques	125
27.2	Étapes supplémentaires pour les empreintes optiques en format STL	131
27.3	Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT	132
28	Articulation anatomique	134
28.1	Interagir avec les mouvements de la mâchoire	135
28.2	Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D	138
28.3	Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen	139
28.4	Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule	140
29	Fonctions de l'espace de travail TMJ	141

29.1 Déplacer les points de tracé	142
29.2 Placer le point inter-incisif.....	143
29.3 Utilisation du triangle de Bonwill.....	144
29.4 Afficher la limite de la segmentation	145
29.5 Afficher le mouvement axé sur les condyles	146
30 Valeurs d'articulateur	147
30.1 Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles visibles	151
30.2 Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles invisibles	153
31 Mesures de distances et d'angles	156
31.1 Ajouter des mesures de distances.....	157
31.2 Ajouter des mesures d'angles	158
31.3 Déplacer des mesures, des points de mesure et des valeurs de mesure.....	160
32 Exportation de données	162
33 Processus de commande	163
33.1 Définir une position thérapeutique.....	164
33.2 Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier	166
33.3 Ouvrir le panier	170
33.4 Contrôler le panier et terminer la commande.....	171
33.5 Terminer une commande via une connexion Internet active	172
33.6 Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal.....	173
33.7 SICAT WebConnector	174
33.8 Terminer une commande sans connexion Internet active	176
34 Réglages	180
34.1 Utiliser les réglages généraux.....	181
34.2 Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE.....	183
34.3 Utiliser les informations sur le cabinet	185
34.4 Modifier les réglages de visualisation	186
34.5 Modifier les réglages de SICAT Function.....	188
35 Assistance	189
35.1 Ouvrir les possibilités d'assistance	190
35.2 Informations de contact et outils d'assistance	191
35.3 Info.....	192
36 Ouvrir les données en mode de lecture seule.....	193
37 Fermer SICAT Suite	195
38 Raccourcis clavier.....	196
39 Désinstaller SICAT Suite	197
40 Consignes de sécurité	199
41 Précision.....	206
Glossaire.....	207

Index 208

1 UTILISATION CONFORME

SICAT Function est un logiciel de visualisation et de segmentation d'informations d'images de la zone oro-maxillo-faciale et de représentation des mouvements de la mâchoire.

Les informations d'images sont issues de scanners médicaux (scanners CT ou DVT, p. ex.) et de systèmes de prise d'empreintes optiques. Les informations de mouvement proviennent p. ex. d'appareils de condylographie.

SICAT Function assiste le chirurgien-dentiste qualifié lors de l'examen, du diagnostic et de la préparation de la thérapie dans le domaine maxillo-facial ainsi que lors de la planification du traitement thérapeutique de difficultés affectant l'appareil masticatoire.

Les données de planification peuvent être extraites de SICAT Function pour être utilisées pour la réalisation de la thérapie.

2 HISTORIQUE DES VERSIONS

VERSION 1.4

- Pour des raisons réglementaires, les applications SICAT nécessitent une licence également pour le mode viewer. Des applications sans une licence ne sont pas disponibles. SICAT ajoute automatiquement à votre code d'activation client des licences viewer d'applications qui sont autorisées dans votre pays. Vous pouvez activer les licences viewer en désactivant puis réactivant n'importe quelle licence. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [▶ Page 48 - *SIDEXIS 4*].
- Les instructions de service sont également disponibles dans la version standalone et dans plug-in SIDEXIS XG sous la forme de fichiers PDF.
- SICAT Function un axe virtuel peut être calculé à l'aide de données de mouvement de la mâchoire.
- SICAT Function indique les longueurs du côté du triangle de Bonwill.

VERSION 1.3

- Module SIDEXIS 4
- Prise en charge des langues italienne, espagnole, portugaise, néerlandaise et russe
- Le numéro de version de SICAT Function correspond maintenant au numéro de version de SICAT Suite.
- Commande de gouttières thérapeutiques également possible via la fabrication d'un modèle en plâtre.
- **TMJ**Espace de travail visualisant les mouvements des condyles segmentés.
- La segmentation peut être traitée après fermeture de la fenêtre de segmentation.


VERSION 1.1

- Prise en charge des langues française et japonaise
- Correction de l'orientation du volume
- Commande de gouttières thérapeutiques
- Modification du format des données de mouvement de la mâchoire en fichiers .jmt
- Exportation des empreintes optiques avec tracés des mouvements intégrés

VERSION 1.0

- Version initiale
- Prise en charge des langues anglaise et allemande

3 CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE



ATTENTION

Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.

Processeur	Quad Core 2,3 GHz
Mémoire de travail	8 Go
Carte graphique	Dédiée* DirectX 11 ou version supérieure Mémoire graphique 2 Go Pilote actuel avec prise en charge de WDDM 1.0 au minimum
Écran	Résolution minimale 1 920 x 1 080 pixels avec un niveau de mise à l'échelle de 100 à 125 pour cent** Résolution maximale 3 840 x 2 160 pixels avec un niveau de mise à l'échelle de 100 à 200 pour cent**
Espace libre sur le disque dur	20 Go et un espace supplémentaire pour les jeux de données
Supports de stockage	Accès au support de stockage externe contenant les fichiers d'installation.
Périphériques d'entrée	Clavier, souris
Réseau	Ethernet, 100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s recommandé
Imprimante pour l'information du patient	Minimum 300 dpi Format de papier DIN A4 ou lettre US
Système d'exploitation	Windows 7 SP1 (64 bits) avec KB2670838 Windows 8 (64 bits, Desktop) Windows 8.1 (64 bits, Desktop) Windows 10 (64 bits, Desktop)
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer 11 ou version supérieure Mozilla Firefox 39 ou version supérieure Google Chrome 44 ou version supérieure JavaScript doit être activé. Un navigateur standard doit être réglé.

Viewer PDF	Par exemple Adobe Reader DC ou version supérieure
SIDEXIS XG avec SICAT Suite en tant que plug-in	Version 2.6.1 (64 bits)
SIDEXIS 4 avec SICAT Suite en tant que module	Version 4.2 SiPlanAPI V4
SIDEXIS 4 avec SICAT Suite en tant que plug-in	Version 4.1.2 (64 bits)



*SICAT Suite ne prend en charge que des cartes graphiques dédiées à partir du niveau de performance de NVIDIA GeForce 960 GTX. Les cartes graphiques intégrées ne sont pas prises en charge.

**La combinaison entre une résolution d'écran faible et un niveau de mise à l'échelle élevé peut entraîner une visualisation incomplète de certaines parties de l'interface utilisateur par le logiciel.

L'écran doit être réglé de manière à afficher correctement la mire SMPTE. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE* [► Page 183 - SIDEXIS 4].

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

SICAT Suite requiert les composants logiciels suivants et les installe au cas où ils ne le seraient pas encore :

- Microsoft .NET Framework 4.5
- Logiciel de gestion de licence CodeMeter 6.30d
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

Le SICAT WebConnector nécessite des ports déterminés pour la communication avec le serveur SICAT. Les ports doivent être validés dans votre pare-feu :

PROTOCOLE	SENS DE LA CONNEXION	PORT
HTTP	Sortant	80
HTTPS	Sortant	443
FTPS - Gestion	Sortant	21
FTPS - Transmission de données	Sortant	49152-65534



Vous pouvez aussi commander sans le SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [► Page 163 - SIDEXIS 4].

4 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Il est essentiel que vous lisiez les chapitres suivants relatifs à la sécurité :

- *Définition des niveaux de danger* [▶ Page 13 - SIDEXIS 4]
- *Qualification des opérateurs* [▶ Page 14 - SIDEXIS 4]
- *Consignes de sécurité* [▶ Page 199 - SIDEXIS 4]

4.1 DÉFINITION DES NIVEAUX DE DANGER

La présente notice d'instruction fait appel aux marquages de sécurité suivants pour éviter les blessures aux opérateurs et aux patients ainsi que les dommages matériels :

**ATTENTION**

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures légères si rien n'est fait pour l'éviter.

REMARQUE

Indique des informations importantes qui ne conditionnent toutefois pas la sécurité.

4.2 QUALIFICATION DES OPÉRATEURS



ATTENTION

L'utilisation de ce logiciel par du personnel non qualifié peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

Seul des opérateurs qualifiés sont autorisés à utiliser ce logiciel.

Seul un personnel disposant d'une qualification ou d'une formation appropriée est autorisé à utiliser le logiciel.

Si vous effectuez une formation ou si vous utilisez ce logiciel dans le cadre d'une formation générale, vous ne devez utiliser ce logiciel que sous la supervision permanente d'une personne qualifiée.

Vous devez remplir les conditions suivantes pour utiliser le logiciel :

- Vous avez lu la notice d'instruction.
- Vous êtes familiarisé(e) avec la structure de base et les fonctions du logiciel.
- Vous êtes en mesure de reconnaître des dysfonctionnements du logiciel et de prendre les mesures appropriées en cas de besoin.

5 SYMBOLES ET MISES EN RELIEF UTILISÉS

SYMBOLES

Cette notice d'instruction utilise le symbole suivant :



Le symbole d'information indique des informations supplémentaires, telles que des méthodes alternatives.

MISES EN RELIEF

Les textes et les désignations d'éléments qui sont visualisés par SICAT Suite sont mis en relief en caractères **gras**. Il s'agit des objets suivants de l'interface utilisateur :

- Désignations de zones
- Désignations de boutons
- Désignations d'icônes
- Textes d'indications et de messages apparaissant à l'écran

TÂCHES À RÉALISER

Les tâches à réaliser sont décrites sous forme de listes numérotées :

- ☑ Les conditions préalables sont identifiées par ce symbole.
- 1. Les étapes sont identifiées par des numéros.
 - ▶ Les résultats intermédiaires sont identifiés par ce symbole et mis en retrait.
- 2. Ils sont suivis d'autres étapes.
 - ▶ Les résultats finals sont identifiés par ce symbole.
 - Une instruction qui se compose d'une seule étape est identifiée par ce symbole.

6 VUE D'ENSEMBLE DE LA NOTICE D'INSTRUCTION

SICAT Function fait partie de SICAT Suite comme d'autres applications.

SICAT Suite compose l'environnement dans lequel s'exécutent les applications SICAT. L'installation des applications s'effectue par conséquent avec SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 19 - SIDEXIS 4].

À ce jour, SICAT Suite est disponible en trois variantes. Quelques-unes des étapes de commande varient selon la variante. C'est pourquoi la notice d'instruction traite les variantes séparément :

- Module SIDEXIS 4
- Plug-in SIDEXIS XG
- Version standalone

Vous n'avez pas besoin d'opter pour une variante ou une autre lors de l'installation de SICAT Suite.

La désinstallation des applications s'effectue également avec SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Désinstaller SICAT Suite* [► Page 197 - SIDEXIS 4].

7 APERÇU GÉNÉRAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite se compose des éléments suivants :

- SICAT Function - l'utilisation conforme de SICAT Function est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Function.
- SICAT Air - l'utilisation conforme de SICAT Air est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Air.
- SICAT Endo - l'utilisation conforme de SICAT Endo est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Endo.

LANGUES

L'interface utilisateur de SICAT Suite prend en charge les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- Français
- Japonais
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Portugais
- Russe

LICENCES

Les étapes suivantes sont nécessaires pour activer une application SICAT ou une fonction individuelle.

- Vous contactez votre partenaire commercial local.
- Vous obtenez un code de bon échange.
- Vous générez une clé de licence à partir du code de bon échange sur SICAT Portal (accessible par la page d'accueil SICAT).
- SICAT ajoute la clé de licence à votre clé d'activation.
- Vous activez avec votre clé d'activation des applications SICAT ou différentes fonctions sur des ordinateurs sur lesquels SICAT Suite est installée.

VERSION COMPLÈTE ET MODE VIEWER

SICAT Suite peut démarrer dans deux modes différents :

- Si vous n'avez pas activé la licence viewer d'au moins une application SICAT, SICAT Suite démarre en mode viewer.
- Si vous n'avez pas activé la licence en version complète d'au moins une application SICAT, SICAT Suite démarre en version complète.

Règles générales :

- Les applications dont la licence en version complète est activée démarrent en version complète.
- Les applications dont la licence viewer est activée démarrent en mode viewer.
- Les applications dont la licence n'est pas activée ne démarrent pas.
- Vous n'avez pas besoin d'opter pour un mode ou un autre lors de l'installation de SICAT Suite.

8 INSTALLER SICAT SUITE



En cas de modification du logiciel, celui-ci risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Ne procédez à aucune modification de l'installation du logiciel.
2. Ne supprimez et ne modifiez aucun composant compris dans le répertoire d'installation du logiciel.



Des supports d'installation endommagés peuvent entraîner l'échec de l'installation.

Manipulez les supports d'installation avec soin et entreposez-les de manière appropriée.



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.



Des autorisations insuffisantes peuvent entraîner l'échec de l'installation ou de la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous de disposer d'autorisations suffisantes sur votre système lorsque vous installez ou mettez à jour le logiciel.



La fonction **Autostart** de Windows est éventuellement désactivée sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir le support optique dans l'explorateur de fichiers de Windows et démarrer manuellement le fichier **SICATSuiteSetup.exe**, le nom du fichier contenant la version de SICAT Suite.

Procédez de la manière suivante pour installer SICAT Suite :

- Votre ordinateur remplit les exigences de configuration système requises. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Configuration système requise* [► Page 10 - SIDEXIS 4].
1. Insérez le support d'installation de SICAT Suite dans le lecteur optique de votre ordinateur.
 - La fenêtre **Autostart** s'ouvre.
 2. Dans la fenêtre **Autostart**, sélectionnez l'option **Exécuter SICATSuiteSetup.exe**, le nom du fichier contenant la version de SICAT Suite.
 - La configuration logicielle requise est installée, si elle n'est pas déjà disponible sur votre ordinateur.



- Le programme d'installation de SICAT Suite démarre et la fenêtre **INTRODUCTION** s'ouvre :




3. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre **INTRODUCTION**, sélectionnez la langue souhaitée du programme d'installation de SICAT Suite puis cliquez sur **Suivant**.

► La fenêtre **CONTRAT DE LICENCE** s'ouvre :



4. Lisez en entier le contrat de licence de l'utilisateur final, cochez la case d'option **J'accepte les conditions du contrat de licence** puis cliquez sur **Suivant**.

► La fenêtre **OPTIONS** s'ouvre :

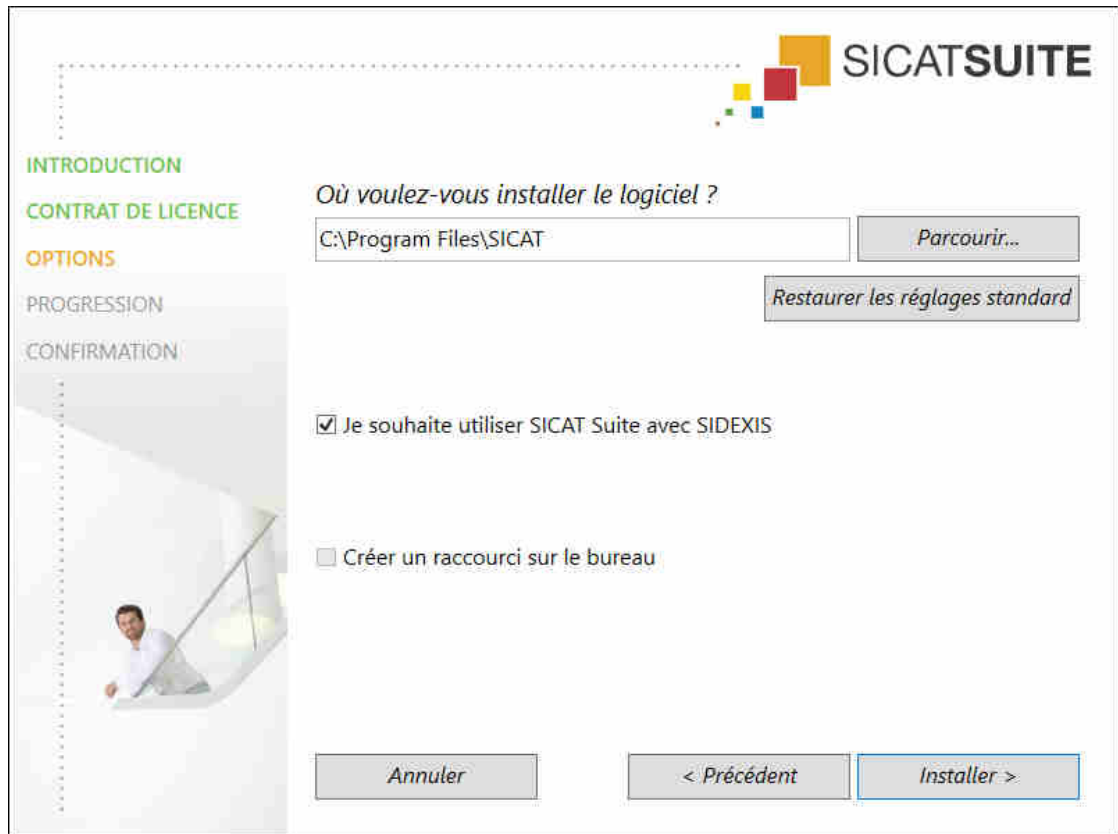

5. Pour modifier le dossier du disque dur dans lequel le programme d'installation installe SICAT Suite, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Sélectionner un dossier** s'ouvre.
6. Naviguez jusqu'au dossier souhaité, dans lequel le programme d'installation SICAT Suite doit créer le répertoire « SICAT Suite », puis cliquez sur **OK**.
 - Le programme d'installation de SICAT Suite insère le chemin du dossier sélectionné dans le champ **Où voulez-vous installer le logiciel**.
7. Si SIDEXIS XG ou SIDEXIS 4 est installé sur votre ordinateur, la case à cocher **Je souhaite utiliser SICAT Suite avec SIDEXIS** est disponible. Vous pouvez enregistrer SICAT Suite manuellement, pendant l'installation ou ultérieurement, en tant que plug-in SIDEXIS XG ou module SIDEXIS 4.
 - Lorsque la case **Je souhaite utiliser SICAT Suite avec SIDEXIS** est cochée, la case **Créer un raccourci sur le bureau** n'est pas disponible.
8. Activez ou désactivez la case à cocher **Créer un raccourci sur le bureau**, si elle est disponible.
9. Cliquez sur le bouton **Installer**.

- La fenêtre **PROGRESSION** s'ouvre :



- SICAT Suite et la configuration logicielle restante sont installés.
- Une fois l'installation terminée, la fenêtre **CONFIRMATION** s'ouvre :



10. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

▶ Le programme d'installation de SICAT Suite se ferme.

9 EFFECTUEZ LES ÉTAPES D'ESSAI APRÈS LA MISE À JOUR DU SYSTÈME D'EXPLOITATION



En cas de modification du système d'exploitation, les applications SICAT risquent de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Avant chaque démarrage des applications SICAT, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations ou des mises à jour de sécurité depuis la dernière utilisation des applications SICAT.
2. Si le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations ou des mises à jour de sécurité, effectuez les étapes nécessaires au contrôle des applications SICAT tel que décrit dans les instructions de service.
3. Si le comportement des applications SICAT divergent du comportement décrit dans les instructions de service, n'utilisez plus le logiciel et contactez immédiatement l'assistance SICAT.


Si le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations, vous devez vous assurer que le fonctionnement de SICAT Function est parfait. Effectuez les étapes d'essai suivantes. Si vous constatez des divergences lors d'une étape d'essai, empêchez l'utilisation ultérieure de SICAT Function sur l'ordinateur concerné puis contactez l'assistance SICAT.

PRÉPARATIONS

1. Supprimer le patient « Axx Patient » afin de s'assurer qu'aucune personne non autorisée apporte des modifications.
2. Importez le jeu de données de référence depuis le fichier « SICASuite_ReferenceDataset_1.4.zip »
Le jeu de données se trouve sur le support d'installation de SICAT Suite.
3. Ouvrez le jeu de données de référence « Axx Patient » dans SICAT Function.

SEGMENTATION DE LA MÂCHOIRE INFÉRIURE


1. Assurez-vous que l'espace de travail **Panorama** est activé.
2. Réinitialisez les vues sur des valeurs standard.
3. Assurez-vous que la vue **3D** montre la radiographie 3D de face.
4. Mettez le mode d'affichage sur **Masquer la région d'arrière-plan**.
5. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « lateral_lt.1 ».
6. Comparez la vue **3D** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation de la segmentation de la mâchoire inférieure et des empreintes optiques.

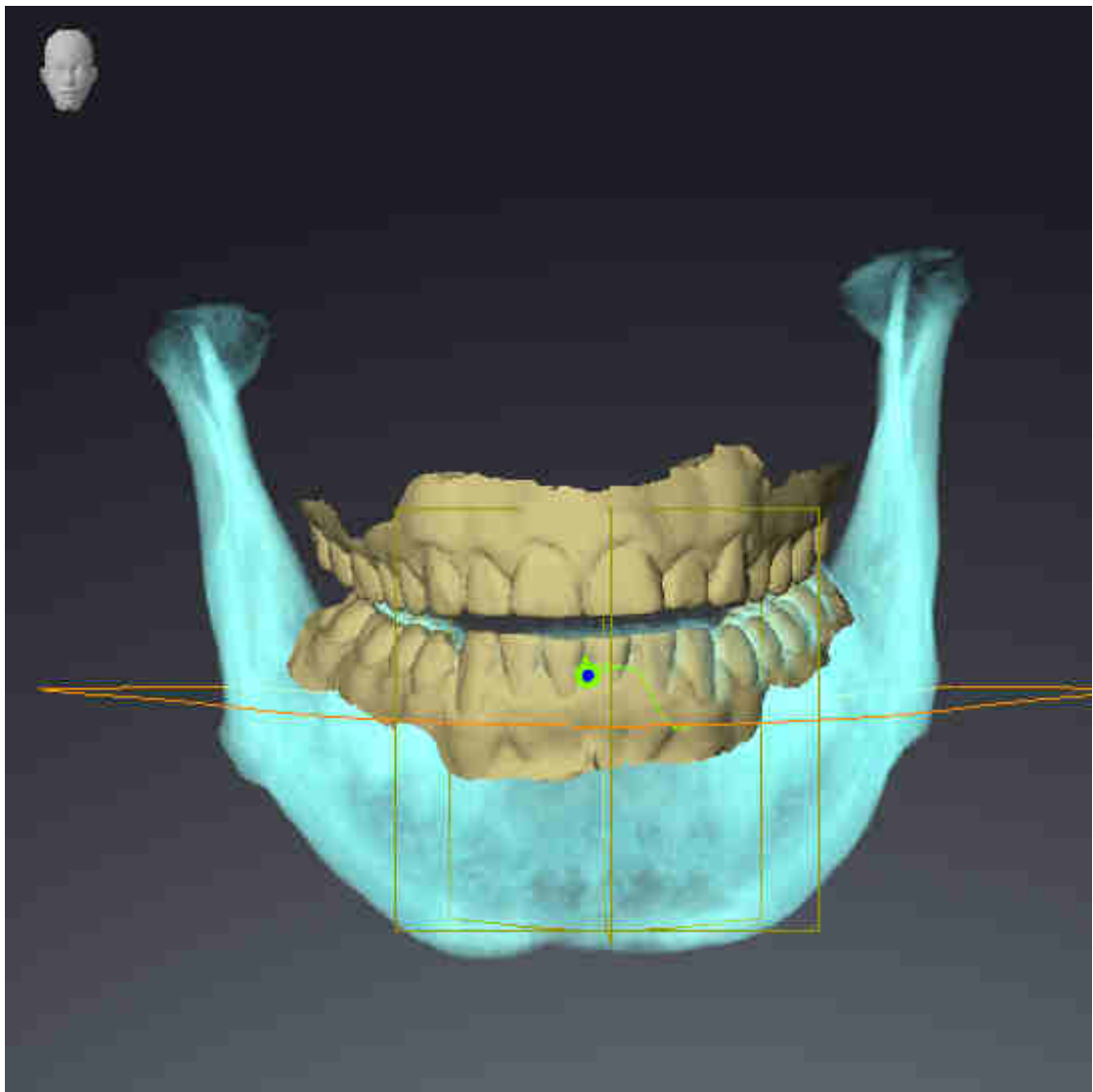


DONNÉES DE MOUVEMENT

1. Assurez-vous que l'espace de travail **TMJ** est activé.
2. Assurez-vous que les valeurs pour **Luminosité** et **Contraste** correspondent respectivement à la valeur standard de 50 %.

3. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « lateral_lt.1 ».
4. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Régions du volume** > **Mandibule** l'élément **Côté droit de la mandibule** et focalisez-le.
5. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Régions du volume** > **Mandibule** l'élément **Côté gauche de la mandibule** et focalisez-le.
6. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'élément **Régions du volume**.
7. Activez dans l'espace **Propriétés** l'option **Afficher la limite de la segmentation**.
8. Comparez la vue **Condyle droit Sagittal** avec la capture d'écran suivante.

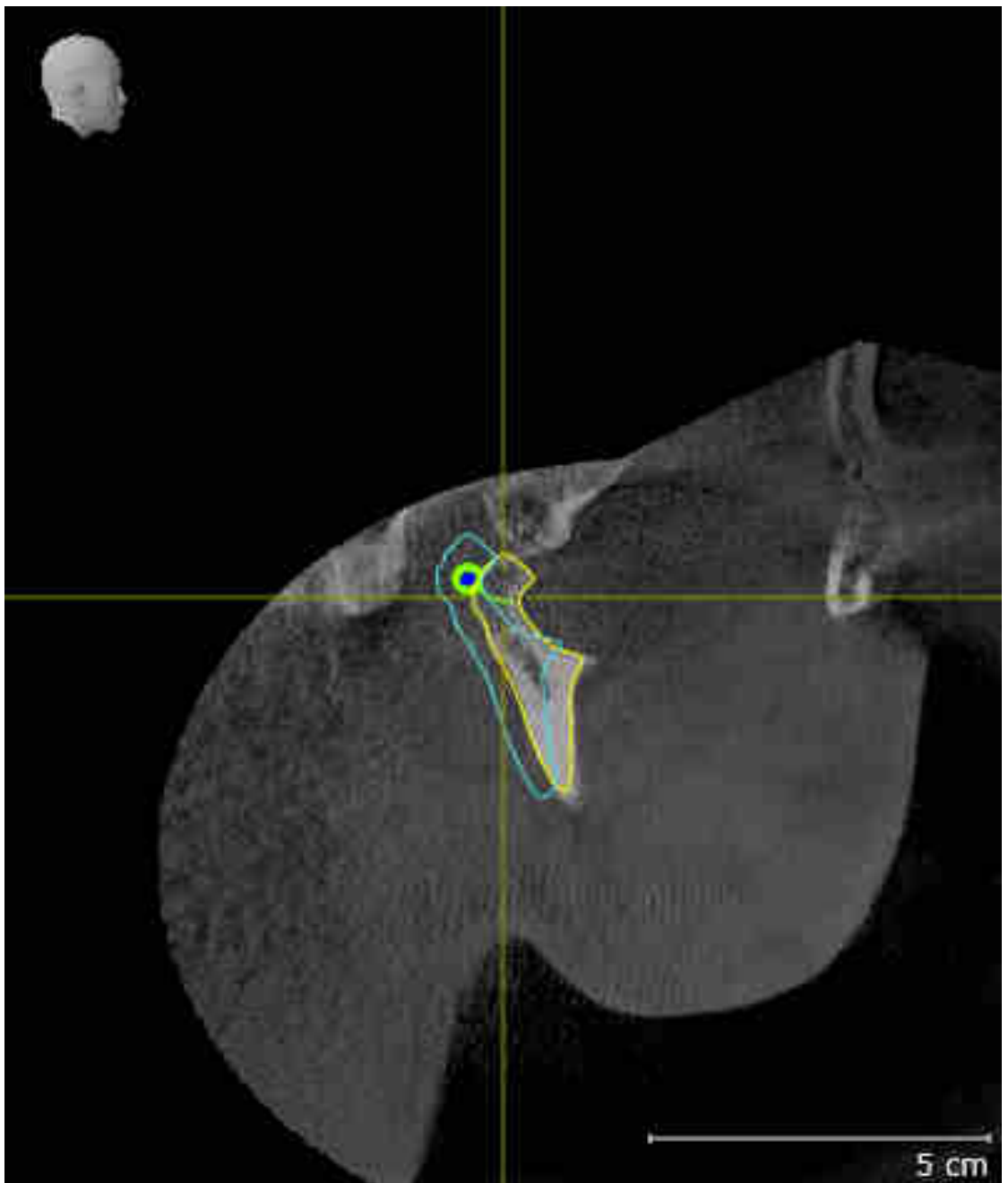


9. Comparez la vue **Condyle gauche Coronal** avec la capture d'écran suivante.

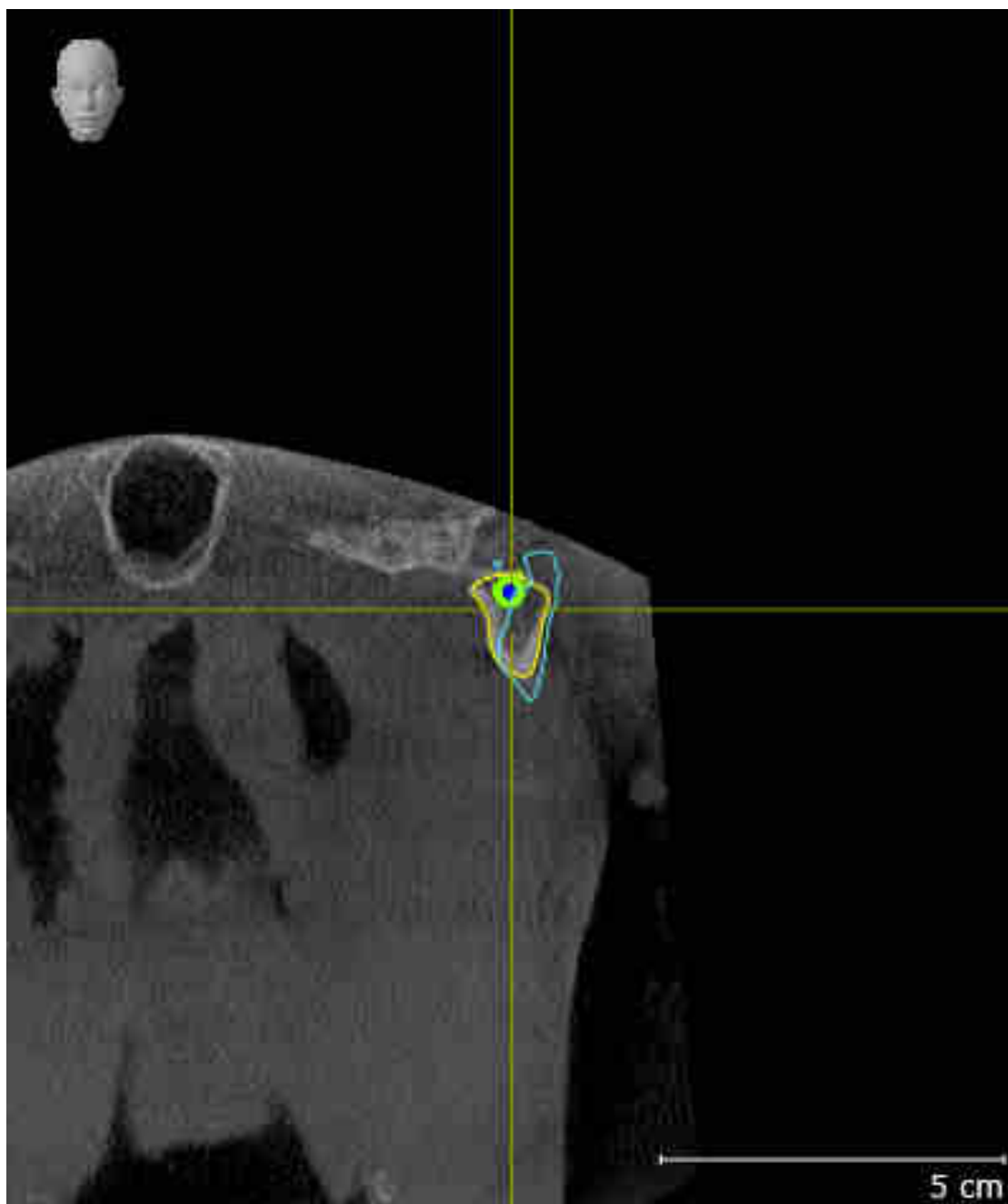

TRIANGLE DE BONWILL


1. Assurez-vous que l'espace de travail **TMJ** est activé.
2. Assurez-vous que la vue **3D** montre la radiographie 3D de face.
3. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'élément **Données de mouvement**.
4. Activez dans l'espace **Propriétés** l'option **Triangle de Bonwill**. Assurez-vous que la valeur pour **Incrément** est bien « 5 ».
5. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « chewing.1 ».
6. Mettez le mode d'affichage de la vue **3D** sur **Masquer la région d'arrière-plan**.
7. Masquez les empreintes optiques.
8. Comparez la vue **3D** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation du triangle Bonwill et des points de suivi disponibles.

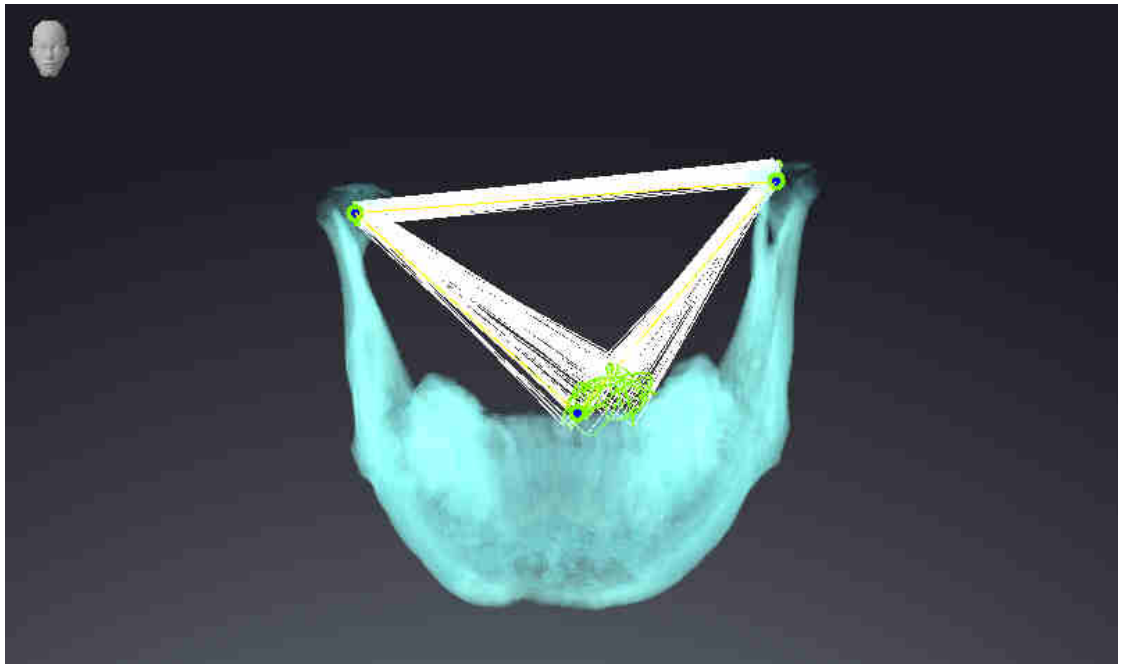

MESURES


1. Assurez-vous que l'espace de travail **MPR/Radiologie** est activé.
2. Assurez-vous que dans la vue **Axial** les valeurs pour **Luminosité** et **Contraste** correspondent respectivement à la valeur standard de 50 %.
3. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Mesures** > l'élément « 20,99 mm » et focalisez-le.

4. Comparez la vue **Axial** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation des objets de mesure (20,99 mm, 20,05 mm, 74,57 mm et 29,43°).

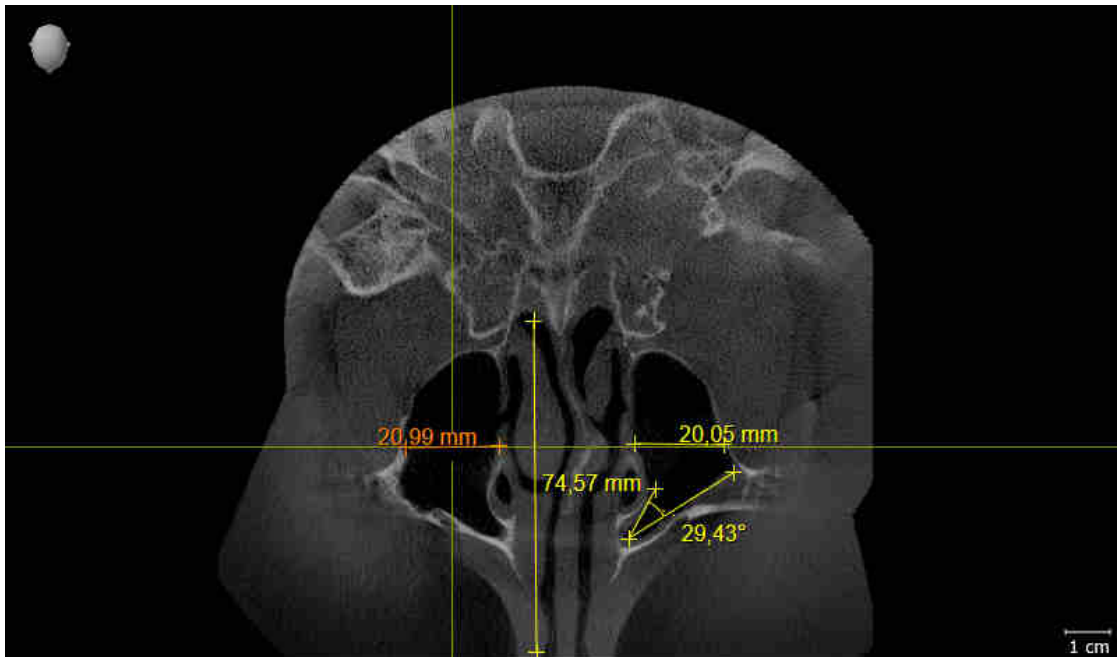

VUE PANORAMIQUE

1. Assurez-vous que l'espace de travail **Panorama** est activé.
2. Réinitialisez les vues sur des valeurs standard.
3. Comparez la vue **Panorama** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation de la vue **Panorama** et de la fenêtre d'examen.

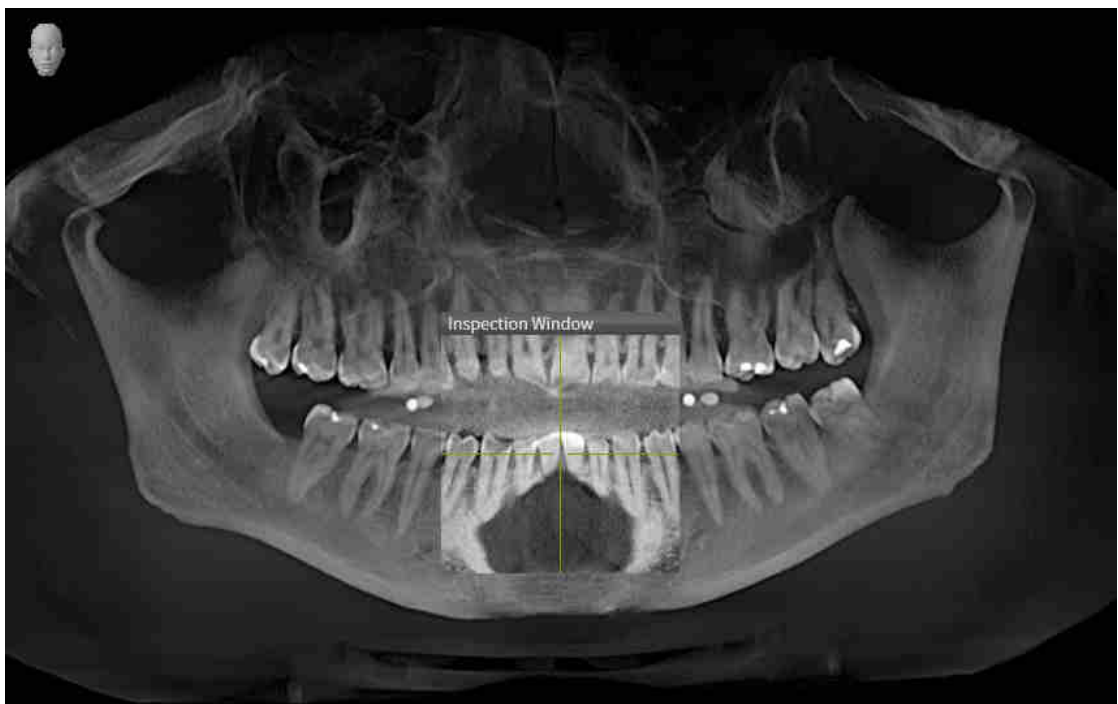

10 ACTUALISER OU RÉPARER SICAT SUITE

ACTUALISER SICAT SUITE

Vous pouvez actualiser SICAT Suite en démarrant le programme d'installation de SICAT Suite et en cliquant sur le bouton **Actualiser**. Le programme d'installation désinstalle d'abord l'ancienne version de SICAT Suite. Toutes les données et tous les réglages sont conservés.



Une nouvelle version de la version standalone de SICAT Suite a besoin de dépôts de dossiers patient actualisés. Au premier démarrage de la nouvelle version ou lorsque vous activez un dépôt de dossiers patient obsolète, SICAT Suite demande si vous voulez actualiser le dépôt de dossiers patient. Si vous confirmez le message, SICAT Suite actualise automatiquement le dépôt de dossiers patient. **ATTENTION ! Vous ne pouvez plus utiliser les dépôts de dossiers patient actualisés avec des versions antérieures de SICAT Suite.**



Lorsque vous mettez à niveau SIDEXIS XG vers SIDEXIS 4.1.3 ou vers une version supérieure puis actualisez SICAT Suite, le SICAT Suite-Installer enregistre SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4. Lorsque vous ouvrez une radiographie 3D, SICAT Suite vérifie si des études existent dans SIDEXIS XG pour cette radiographie 3D, et les reprend de SIDEXIS XG vers SIDEXIS 4.

RÉPARER SICAT SUITE

Vous pouvez réparer SICAT Suite en démarrant le programme d'installation de SICAT Suite et en cliquant sur le bouton **Réparer**. Toutes les données et tous les réglages sont conservés.

L'actualisation et la réparation de SICAT Suite utilisent toutes deux le programme d'installation de SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 19 - SIDEXIS 4].

EFFECTUER LA MISE À JOUR DU PLUG-IN VERS UN MODULE POUR SIDEXIS 4

À partir de la version 1.3, SICAT Suite prend en charge SIDEXIS 4 à partir de la version 4.1.3 en tant que module, mais non plus en tant que plug-in. Si vous installez la mise à jour vers SICAT Suite 1.3 après SIDEXIS 4, l'enregistrement en tant que module est automatique. Si vous actualisez SIDEXIS 4 après la mise à jour de SICAT Suite, vous devez effectuer l'enregistrement manuellement. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4* [► Page 39 - SIDEXIS 4].

11 PARTICULARITÉS DANS CETTE VERSION

Il existe des différences dans des espaces déterminés selon si vous utilisez SICAT Function individuellement ou raccordé à d'autres logiciels.

ENREGISTREMENT MANUEL EN TANT QUE MODULE SIDEXIS 4

En plus de l'intégration automatique pendant l'installation, vous pouvez enregistrer et supprimer SICAT Suite manuellement, en tant que module SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4* [► Page 39 - SIDEXIS 4].

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

En tant que module SIDEXIS 4, SICAT Suite démarre dans SIDEXIS 4 dans la phase **Plan & Treat**. Le démarrage de SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4 est décrit sous *Démarrer SICAT Suite* [► Page 43 - SIDEXIS 4].

DONNÉES PATIENT ET DONNÉES DE VOLUME

La version de SICAT Function liée à SIDEXIS utilise les données patient et données de volume de SIDEXIS. La sauvegarde des données s'effectue par conséquent via les procédures prévues pour SIDEXIS.



Il est recommandé de sauvegarder aussi les réglages utilisateur des applications SICAT en plus des données patient. Les réglages utilisateur sont consignés, pour chaque utilisateur séparément, dans deux répertoires. Vous pouvez ouvrir ces répertoires en entrant `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` et `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` dans la barre d'adresses de l'explorateur Windows.

RÉGLAGES

Les réglages SICAT Suite sont disponibles en tant que catégorie dans les réglages SIDEXIS 4.

Dans la version liée à SIDEXIS, SICAT Suite affiche uniquement les valeurs de certains réglages, car il les reprend de SIDEXIS.

LICENCES

La version standalone et la version liée à d'autres logiciel de SICAT Suite utilisent les mêmes licences. Vous n'avez pas besoin d'opter pour une version ou une autre lors de l'installation de SICAT Suite.

SYNCHRONISATION DES DONNÉES ENTRE SICAT FUNCTION ET SIDEXIS 4

SICAT Function et SIDEXIS 4 synchronisent l'orientation du volume et la zone panoramique dans les deux sens. Les restrictions suivantes s'appliquent :

- SICAT Function prend uniquement en charge les rotations de l'orientation du volume jusqu'à 30 degrés maxi.
- Lorsque la synchronisation de l'orientation du volume a un impact sur des objets de diagnostic déjà ajoutés et basés sur une autre orientation du volume, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement. La fenêtre d'avertissement vous informe sur les répercussions exactes de la synchronisation et vous pouvez choisir entre les options suivantes :
 - **Synchroniser**
 - **Pas maintenant**
 - **Jamais** pour la radiographie 3D actuelle et l'orientation du volume actuel dans SIDEXIS 4
- Lorsque la synchronisation de la zone panoramique a un impact sur des objets de diagnostic ou de planification déjà ajoutés et basés sur une autre zone panoramique, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement. Vous pouvez choisir entre deux options dans la fenêtre d'avertissement.
 - **OK** - SICAT Function effectue la synchronisation et enlève les objets.
 - **Annuler** - SICAT Function n'effectue pas la synchronisation et conserve les objets.
- SICAT Function prend uniquement en charge la courbe panoramique standard de SIDEXIS 4, pas le décalage individuel de points.
- SICAT Function prend uniquement en charge les épaisseurs de courbe panoramique d'au moins 10 mm.
- SICAT Function prend uniquement en charge les courbes panoramiques que vous n'avez pas tournées dans SIDEXIS 4.

Si au moins une de ces restrictions s'applique, SICAT Function et SIDEXIS 4 cessent de synchroniser l'orientation du volume et la zone panoramique ou seulement la zone panoramique.

De plus, SICAT Function reprend le point de focalisation et le sens de vision de la vue **3D** de SIDEXIS 4 lorsque vous ouvrez pour la première fois une radiographie 3D dans SICAT Function.

EXPORTATION DE DONNÉES

Lorsque SICAT Suite s'exécute en tant que module SIDEXIS 4, l'exportation des données s'effectue via les fonctions correspondantes de SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de SIDEXIS 4.

AJOUTER DES CAPTURES D'ÉCRAN À L'ÉDITION SIDEXIS 4

Vous pouvez ajouter des captures d'écran de vues et d'espaces de travail à l'édition SIDEXIS 4. Vous pouvez ensuite utiliser les possibilités de la sortie 2D de SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de SIDEXIS 4.

PANIER D'ACHAT

Vous trouvez le panier dans SICAT Suite et dans la phase **Sortie** de SIDEXIS 4.

OUVRIR DES ÉTUDES AVEC OU SANS DROITS D'ACCÈS EN ÉCRITURE



Si l'ordinateur sur lequel s'exécutent SIDEXIS 4 et SICAT Suite appartient à un réseau et que SIDEXIS 4 et la configuration du réseau le permettent, SIDEXIS 4 peut faire partie d'une installation multi-station. Ceci a pour conséquence, entre autres, que d'autres stations de travail peuvent vous retirer les droits d'accès aux données ouvertes. Dans ce cas, SIDEXIS 4 ferme immédiatement le jeu de données et vous ne pouvez pas enregistrer les modifications des études SICAT Function.

Pour vous permettre d'effectuer et d'enregistrer des modifications des études SICAT Function, il faut que les conditions suivantes soient satisfaites :

- Une licence en version complète SICAT Function doit être activée.

Le tableau ci-dessous indique les fonctions qui sont disponibles selon le cas :

FONCTION	PAS DE LICENCE EN VERSION COMPLÈTE ACTIVÉE	PAS DE LICENCE VIEWER ACTIVÉE	PAS DE LICENCE ACTIVÉE
Zone assistance	Oui	Oui	Oui
Réglages généraux	Oui	Oui	Oui
SICAT Function Réglages	Oui	Oui	Non
Effectuer des modifications	Oui	Non	Non
Visualiser les données, sans enregistrer les modifications	Non	Oui	Non
Aide	Oui	Oui	Oui

Vous pouvez visionner les études SICAT Function aussi sans licence viewer dans les cas suivants :

- Exportez depuis SIDEXIS 4 des études SICAT Function et importez les données vers SIDEXIS sur un autre ordinateur. SICAT Function doit être installé sur cet ordinateur.
- Créez depuis SIDEXIS 4 un paquet Wrap&Go qui contient des études SICAT Function. Installez le paquet Wrap&Go sur un autre ordinateur. Installez ensuite SICAT Function.

Dans les deux cas, vous ne pouvez apporter ou enregistrer aucune modification sur la planification.

Dans certaines conditions, il arrive que vous ne puissiez pas effectuer ni enregistrer des modifications des études SICAT Function, même si une licence d'application est activée. Un processus de commande en cours peut en être la cause.

Autres informations disponibles sous *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [▶ Page 193 - SIDEXIS 4].

12 FLUX DE TRAVAIL STANDARD DE SICAT FONCTION



Des failles de sécurité dans votre système informatique peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

1. Assurez-vous que votre établissement a adopté des directives permettant de détecter et d'éviter toute menace à la sécurité de votre environnement informatique.
2. Installez un antivirus à jour et exécutez-le.
3. Assurez-vous que les fichiers de définition de l'antivirus soient régulièrement mis à jour.



Un accès non autorisé à votre station de travail peut entraîner un risque pour la confidentialité et l'intégrité de vos données patient.

Limitez l'accès à votre station de travail aux personnes autorisées.



Des problèmes de cybersécurité peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

Si vous supposez l'existence de problèmes de cybersécurité de votre application SICAT, prenez immédiatement contact avec l'assistance.



L'enregistrement de données d'application SICAT dans un système de fichiers réseau non fiable peut entraîner la perte de données.

Assurez-vous, en coopération avec votre administrateur réseau, que les données d'application SICAT puissent être enregistrées en toute sécurité dans le système de fichiers réseau souhaité.



L'utilisation commune de SICAT Suite et des applications SICAT intégrées avec d'autres appareils d'un réseau d'ordinateurs ou d'un réseau de stockage peut entraîner des risques jusqu'alors inconnus pour les patients, les utilisateurs et d'autres personnes.

Assurez-vous que des règles soient établies au sein de votre établissement afin de déterminer, d'analyser et d'évaluer les risques liés à votre réseau.



Des risques nouveaux peuvent résulter de modifications de votre environnement réseau telles que des modifications de votre configuration réseau, la connexion d'appareils ou de composants supplémentaires à votre réseau, la déconnexion d'appareils ou de composants du réseau, ainsi que la mise à jour ou la mise à niveau d'appareils ou de composants du réseau.

Effectuez une nouvelle analyse des risques du réseau après chaque modification du réseau.



Avant de commencer le travail avec SICAT Suite, il est important de lire intégralement la présente notice d'instruction, et en particulier toutes les consignes de sécurité. Gardez cette notice d'instruction à portée de main pour y rechercher des informations.

JEUX DE DONNÉES

SICAT Function combine trois jeux de données différents :

- Les données de radiographie 3D, par exemple d'un Sirona GALILEOS
- Les données de mouvement de la mâchoire, par exemple d'un SICAT JMT*
- Des empreintes optiques numériques, par exemple d'un Sirona CEREC

INSTALLATION

L'installation de SICAT Suite est décrite sous *Installer SICAT Suite* [► Page 19 - SIDEXIS 4].

L'enregistrement manuel de SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4 est décrit sous *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4* [► Page 39 - SIDEXIS 4].

VALIDER LA VERSION COMPLÈTE

- Si vous avez acheté une licence pour SICAT Function, activez la licence afin de valider la version complète. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 48 - SIDEXIS 4].



Si vous n'avez pas acheté de licence pour SICAT Function, ouvrez une radiographie 3D en mode viewer. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [► Page 193 - SIDEXIS 4].

RÉGLAGES

Effectuez les réglages souhaités dans la zone **Réglages**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [► Page 180 - SIDEXIS 4].

ACQUISITION DES DONNÉES

1. Pendant que le SICAT Fusion Bite est dans la bouche du patient, prenez un cliché 3D du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les guides rapides SICAT JMT*.
2. Réalisez l'acquisition des données de mouvement de la mâchoire du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les notices d'instruction SICAT JMT*.
3. Réalisez les empreintes optiques du maxillaire et de la mandibule. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de l'appareil correspondant.

OUVRIER UN JEU DE DONNÉES

1. Sélectionnez une radiographie 3D ou une étude SICAT Function dans la Timeline.
2. Démarrez SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Démarrer SICAT Suite* [► Page 43 - SIDEXIS 4].

ÉTAPES DE TRAVAIL DANS SICAT FONCTION



ÉDITER UN JEU DE DONNÉES DANS SICAT FONCTION

1. Si nécessaire, adaptez l'orientation du volume et la zone panoramique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 100 - SIDEXIS 4].
2. Importez et recalez les données de mouvement de la mâchoire dans SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 113 - SIDEXIS 4].
3. Segmentez la mandibule et, le cas échéant, les fosses. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Segmenter la mandibule* [► Page 119 - SIDEXIS 4] et *Segmenter les fosses* [► Page 121 - SIDEXIS 4].
 - SICAT Function visualise les données de mouvement de la mâchoire importées dans la vue **3D**.
4. Importez les empreintes optiques et recalez-les sur les données de radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4].

5. Évaluez les mouvements de la mâchoire dans l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 70 - SIDEXIS 4] et *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 141 - SIDEXIS 4]. Utilisez les tracés anatomiques pour vous aider, en particulier lorsque vous n'avez pas effectué de segmentation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [▶ Page 138 - SIDEXIS 4], *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [▶ Page 139 - SIDEXIS 4], *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [▶ Page 140 - SIDEXIS 4] et *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 135 - SIDEXIS 4].
6. Définissez une position thérapeutique pour la gouttière thérapeutique . Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [▶ Page 164 - SIDEXIS 4].
7. Commandez une gouttière thérapeutique Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [▶ Page 163 - SIDEXIS 4].
8. Exportez des données, p. ex. pour obtenir un deuxième avis. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [▶ Page 162 - SIDEXIS 4].

TERMINER OU INTERROMPRE LE TRAVAIL SUR LES JEUX DE DONNÉES

- Pour terminer ou interrompre votre travail, enregistrez-le en fermant SICAT Suite dans SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fermer SICAT Suite* [▶ Page 195 - SIDEXIS 4].

NOTICE D'INSTRUCTION ET ASSISTANCE

La notice d'instruction est disponible dans la fenêtre **Aide de SICAT Suite**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir les instructions de service* [▶ Page 47 - SIDEXIS 4].

Une assistance supplémentaire est disponible dans la zone **Assistance**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Assistance* [▶ Page 189 - SIDEXIS 4].

13 ENREGISTRER ET SUPPRIMER SICAT SUITE EN TANT QUE MODULE SIDEXIS 4

Vous trouverez des informations générales sur l'utilisation de SICAT Suite avec SIDEXIS 4 sous *Particularités dans cette version* [► Page 32 - SIDEXIS 4].



Lorsque vous installez SICAT Suite après SIDEXIS 4, le programme d'installation de SICAT Suite procède automatiquement à l'enregistrement en tant que module SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Installer SICAT Suite* [► Page 19 - SIDEXIS 4].

OUVRIR LA FENÊTRE "SIDEXIS 4"


1. Démarrez la version standalone de SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Démarrer SICAT Suite* [► Page 43 - SIDEXIS 4].



2. Cliquez sur l'icône **Réglages**.
► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



3. Cliquez sur l'onglet **SIDEXIS 4**.
► La fenêtre **SIDEXIS 4** s'ouvre :

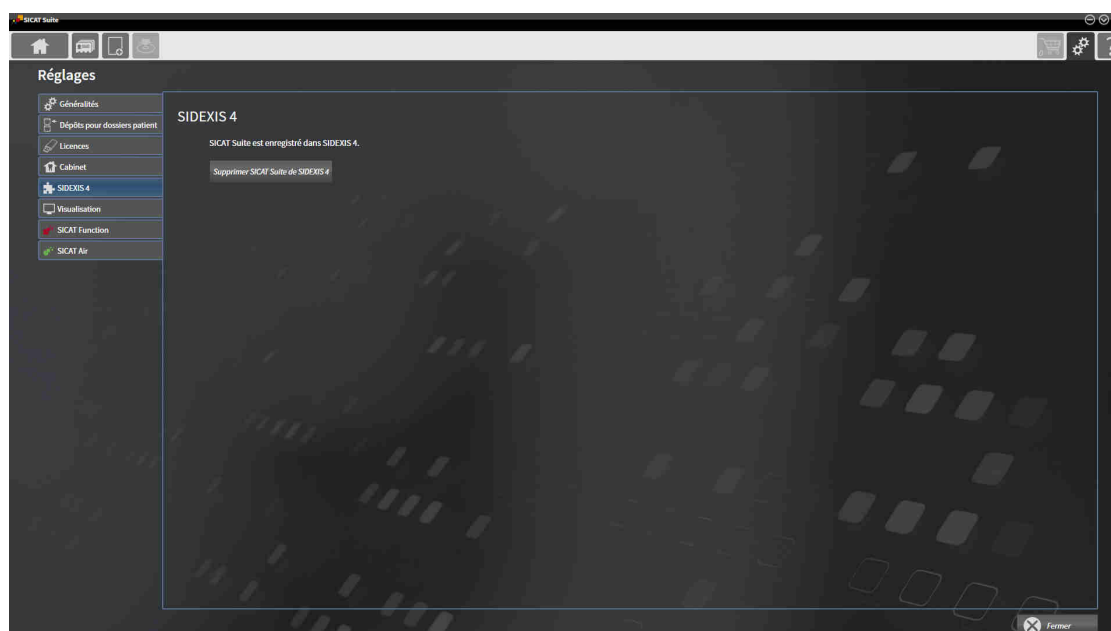


ENREGISTRER SICAT SUITE EN TANT QUE MODULE SIDEXIS 4

- SICAT Suite a été installé avec succès. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 19 - SIDEXIS 4].
- SIDEXIS 4 n'est pas ouvert.
- La version standalone de SICAT Suite est déjà démarrée.
- La fenêtre **SIDEXIS 4** est déjà ouverte.

1. Cliquez sur le bouton **Enregistrer SICAT Suite dans SIDEXIS 4**.

2. Démarrez SIDEXIS 4.

- SICAT Suite est enregistré en tant que module SIDEXIS 4. Si l'enregistrement dans SIDEXIS 4 a réussi, la phase **Plan & Treat** est visible :

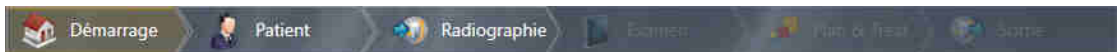

SUPPRIMER SICAT SUITE EN TANT QUE MODULE SIDEXIS 4

- SICAT Suite est déjà enregistré en tant que module SIDEXIS 4.
- SIDEXIS 4 n'est pas ouvert.
- La version standalone de SICAT Suite est déjà démarrée.
- La fenêtre **SIDEXIS 4** est déjà ouverte.

1. Cliquez sur le bouton **Supprimer SICAT Suite de SIDEXIS 4**.

2. Démarrez SIDEXIS 4.

- SICAT Suite n'est plus disponible en tant que module SIDEXIS 4.

14 ÉTUDES SICAT FUNCTION DANS SIDEXIS 4



ATTENTION

Des appareils de radiographie non conformes à DICOM peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que des radiographies 3D d'appareils de radiographie munis d'une déclaration de conformité DICOM.



ATTENTION

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



ATTENTION

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.



ATTENTION

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

REMARQUE

Afin de garantir un diagnostic, un traitement et un recalage corrects des données de mouvement de la mâchoire, SICAT recommande d'utiliser des données de radiographie 3D avec les paramètres suivants :

1. Épaisseur de coupe inférieure à 0,7 mm
2. Taille des voxels inférieure à 0,7 mm dans les trois dimensions

Lorsque SICAT Suite s'exécute en tant que module SIDEXIS 4, la gestion des données patient est effectuée dans SIDEXIS 4.

SIDEXIS 4 affiche des images de prévisualisation relatives aux études SICAT Function, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

- Vous utilisez SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4.
- Une étude SICAT Function est disponible pour le patient sélectionné.



- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Données de mouvement | 4 Position de traitement |
| 2 Segmentation | 5 Plan |
| 3 Empreintes optiques | 6 Commande |

Les images de prévisualisation affichent les informations suivantes :

- Disponibilité des données de mouvement de la mâchoire
- Disponibilité d'une segmentation de l'articulation temporo-mandibulaire
- Disponibilité d'empreintes optiques
- Disponibilité d'une position thérapeutique
- Planification non existante, en cours d'édition ou terminée
- Commande non existante, gouttière thérapeutique à commander dans le panier ou commande téléchargée

Une représentation claire des icônes signifie que l'élément en question est disponible dans une étude.

15 DÉMARRER SICAT SUITE



Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.



Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.

Pour démarrer SICAT Function vous devez tout d'abord démarrer SICAT Suite.

Procédez de la manière suivante pour démarrer SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4 :

- SICAT Suite a été installé avec succès. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 19 - SIDEXIS 4].
- SICAT Suite est déjà enregistré en tant que module SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4* [► Page 39 - SIDEXIS 4]. Lorsque SICAT Suite est installée après SIDEXIS 4, l'enregistrement peut être réalisé automatiquement.
- Vous avez déjà sélectionné une radiographie 3D ou une étude dans SIDEXIS 4.



1. Cliquez à droite à côté du bouton **Afficher dans l'examen 3D** sur l'icône **Afficher dans**.



2. Dans la fenêtre **Afficher dans**, cliquez sur l'icône **SICAT Suite**.

► SIDEXIS 4 passe à la phase **Plan & Treat**.


► SICAT Suite ouvre la radiographie 3D dans une application SICAT.



Si vous ouvrez une radiographie 3D sans étude correspondante et que vous avez activé la licence d'une seule application SICAT, cette application SICAT va démarrer. Si vous ouvrez une radiographie 3D correspondant à plusieurs études et que vous avez activé les licences de plusieurs applications SICAT, c'est l'application SICAT dont l'étude a été modifiée en dernier qui démarrera.

Vous pouvez passer dans une autre application SICAT après avoir ouvert une radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter entre les applications SICAT* [► Page 46 - SIDEXIS 4].


Lorsque vous avez enregistré une étude spécifique à une application, vous pouvez la sélectionner directement dans la fenêtre **Acquisitions** et l'ouvrir dans l'application SICAT correspondante. Si vous avez déjà ajouté au panier un article basé sur cette étude, le panier s'ouvrira.

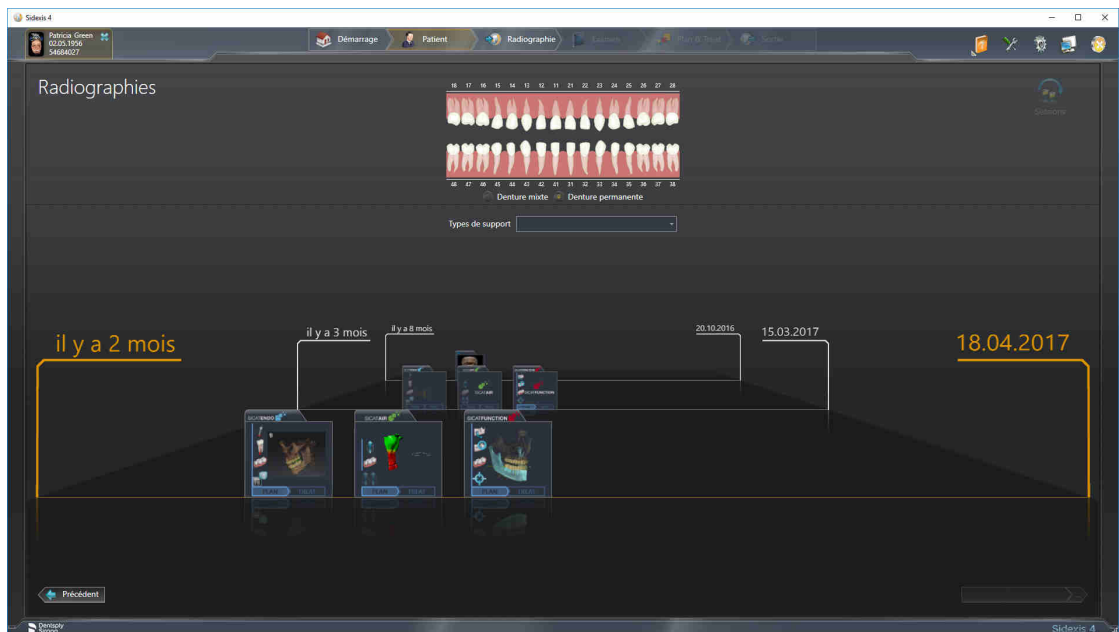

SIDEXIS 4 affiche également les études dans la fenêtre **Détails du patient**, dans la zone **Dernières radiographies**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Études SICAT Function dans SIDEXIS 4* [► Page 41 - SIDEXIS 4].

16 INTERFACE UTILISATEUR DE SICAT SUITE

L'interface utilisateur de SICAT Suite se compose des éléments suivants :

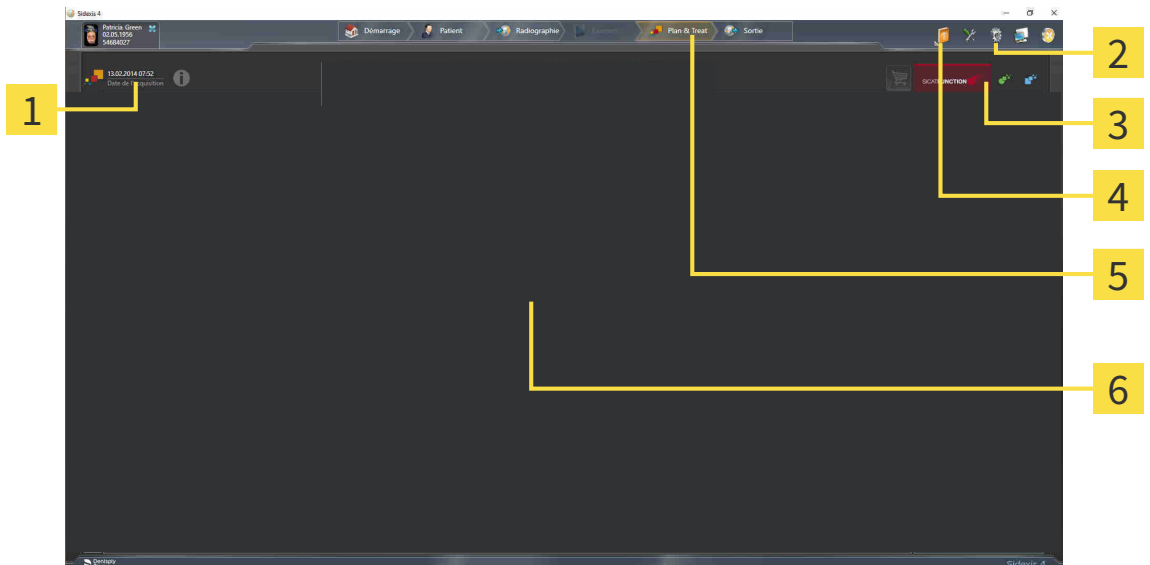

1 Étude actuellement ouverte

2 Réglages

3 Boutons pour commuter entre les applications et bouton **Panier d'achat**

4 Aide

5 Barre de phases de SIDEXIS 4

6 Zone d'application

- Étude actuellement ouverte - vous trouvez ici des informations relatives à l'étude actuellement ouverte ainsi qu'un bouton pour fermer SICAT Suite.
- **Réglages** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [▶ Page 180 - SIDEXIS 4].
- Boutons pour commuter entre les applications et bouton **Panier d'achat** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter entre les applications SICAT* [▶ Page 46 - SIDEXIS 4] et sous *Processus de commande* [▶ Page 163 - SIDEXIS 4].
- **Aide** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir les instructions de service* [▶ Page 47 - SIDEXIS 4].
- La **Zone d'application**, qui occupe le reste de l'espace de SICAT Suite, affiche l'interface utilisateur de l'application SICAT active.

17 COMMUTER ENTRE LES APPLICATIONS SICAT

Procédez de la manière suivante pour commuter entre les applications SICAT :




- Cliquez sur le bouton qui porte la désignation de l'application SICAT souhaitée.
- ▶ SICAT Suite passe à l'application sélectionnée.

18 OUVRIR LES INSTRUCTIONS DE SERVICE

Le menu **Aide** de SIDEXIS 4 contient les notices d'instruction des applications SICAT sous forme de fichiers PDF. Procédez de la manière suivante pour ouvrir la notice d'instruction d'une application SICAT :

1. Cliquez sur l'icône **Aide**.
 - ▶ Une liste des notices d'instruction disponibles s'affiche :

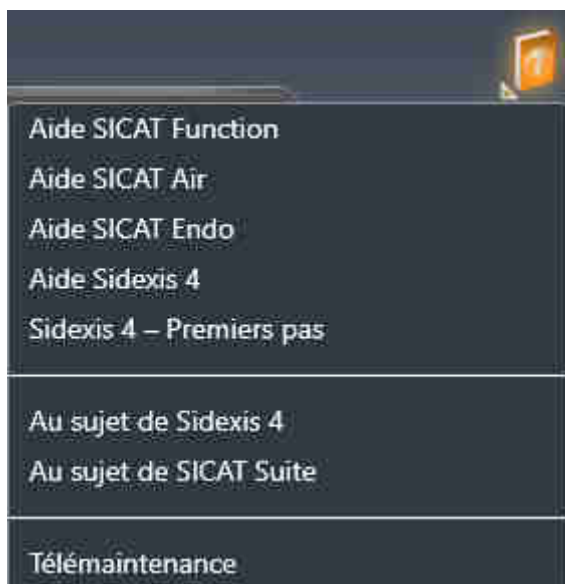

2. Cliquez sur la notice d'instruction voulue.
 - ▶ La notice d'instruction sélectionnée s'ouvre.

Si une application SICAT est ouverte, vous pouvez aussi appuyer sur la touche F1 afin d'ouvrir l'aide affichée.

19 LICENCES

SICAT Suite indique uniquement les applications SICAT pour lesquelles vous avez activé une licence.



Vous pouvez visionner des planifications SICAT Fonction dans la version de SICAT Suite liée à SIDEXIS aussi sans licence SICAT Fonction activée.

Les types de licences suivants existent :

- Une licence viewer avec laquelle vous pouvez utiliser une application sans limite de temps en mode viewer.
- Une licence de démonstration vous permettant d'obtenir un accès limité dans le temps aux versions complètes d'une ou de plusieurs applications SICAT.
- Une licence en version complète vous permettant d'obtenir un accès illimité dans le temps aux versions complètes d'une ou de plusieurs applications SICAT.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour activer une application SICAT ou une fonction individuelle.

- Vous contactez votre partenaire commercial local.
- Vous obtenez un code de bon échange.
- Vous générez une clé de licence à partir du code de bon échange sur SICAT Portal (accessible par la page d'accueil SICAT).
- SICAT ajoute la clé de licence à votre clé d'activation.
- Vous activez avec votre clé d'activation des applications SICAT ou différentes fonctions sur des ordinateurs sur lesquels SICAT Suite est installée.

Ci-après concerne l'activation et la désactivation de licences :

- Vous recevez uniquement des clés licence d'applications SICAT qui sont autorisées dans votre pays.
- Lorsque vous activez une clé d'activation sur un ordinateur, une licence d'applications SICAT comprises ou de fonctions comprises est respectivement liée à l'ordinateur. Les licences ne sont plus disponibles pour une activation sur un autre ordinateur.
- Vous pouvez désactiver des licences individuellement, pour chaque application SICAT, ou différentes fonctions. Les licences restituées sont disponibles pour une nouvelle activation sur le même ordinateur ou sur un autre.
- Si vous restituez la licence en version complète d'une application SICAT, vous recevez automatiquement une licence viewer dans la mesure où l'application est autorisée dans votre pays.
- Lorsque vous activez une licence en version complète, vous recevez automatiquement des licences complètes pour toutes les applications qui sont autorisées dans votre pays.

La conversion d'un code de bon échange dans une clé d'activation est décrite sous *Utiliser des codes de bon d'échange* [► Page 57 - SIDEXIS 4].

La fenêtre **Aperçu de vos licences** fournit une vue d'ensemble des licences qui sont activées sur votre ordinateur. SICAT Suite indique la date d'expiration des licences de démonstration. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [► Page 50 - SIDEXIS 4].


Vous pouvez activer les licences de deux manières différentes :

- Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite dispose d'une connexion Internet active, il est possible de procéder à une activation automatique de la licence. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences via une connexion Internet active* [► Page 51 - SIDEXIS 4].
- Si vous le souhaitez, ou si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite ne dispose pas de connexion Internet active, vous pouvez procéder manuellement à l'activation de la licence en utilisant des fichiers de demande de licence. Vous devez télécharger ces fichiers de demande de licence sur la page Internet de SICAT. En contrepartie, vous recevez un fichier d'activation de licence que vous devez activer dans SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [► Page 53 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez désactiver individuellement des licences pour chaque application ou fonction. Après avoir désactivé une licence, vous pouvez entrer le même code d'activation ou un autre. Les licences restituées sont disponibles pour une activation sur le même ordinateur ou sur un autre. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 55 - SIDEXIS 4].

19.1 OUVRIR LA FENÊTRE "APERÇU DE VOS LICENCES"

1. Cliquez dans la barre de titre de SIDEXIS 4 sur le symbole **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.
2. Cliquez sur le groupe **SICAT Suite**.
▶ Le groupe **SICAT Suite** s'ouvre.
3. Cliquez sur le bouton **Licences**.
▶ La fenêtre **Aperçu de vos licences** s'ouvre :

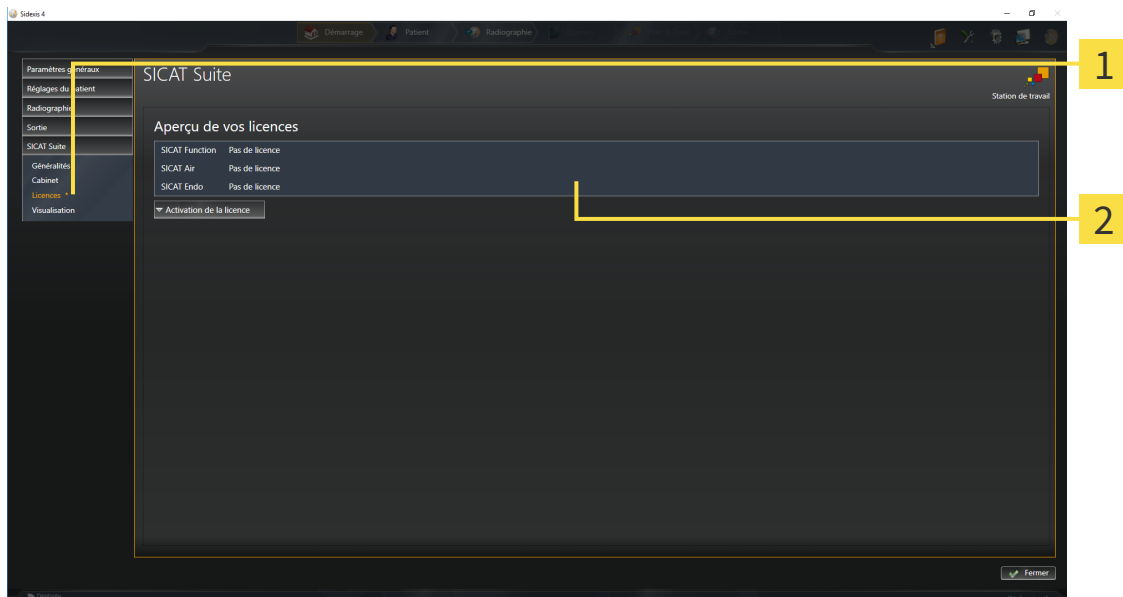

1 Onglet **Licences**

2 Fenêtre **Aperçu de vos licences**

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Activer des licences via une connexion Internet active* [▶ Page 51 - SIDEXIS 4]
- *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [▶ Page 53 - SIDEXIS 4]
- *Restituer des licences au pool de licences* [▶ Page 55 - SIDEXIS 4]

19.2 ACTIVER DES LICENCES VIA UNE CONNEXION INTERNET ACTIVE

REMARQUE

Le dossier patient doit être fermé


Vous devez fermer le dossier patient actif avant de procéder à des modifications des licences.

Procédez de la manière suivante pour démarrer la procédure d'activation :

- ☑ Il manque une licence activée à au moins une application SICAT ou une fonction individuelle.
- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [► Page 50 - SIDEXIS 4].

1. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur le bouton **Activation de la licence**.

► La zone **Aperçu de vos licences** est développée :

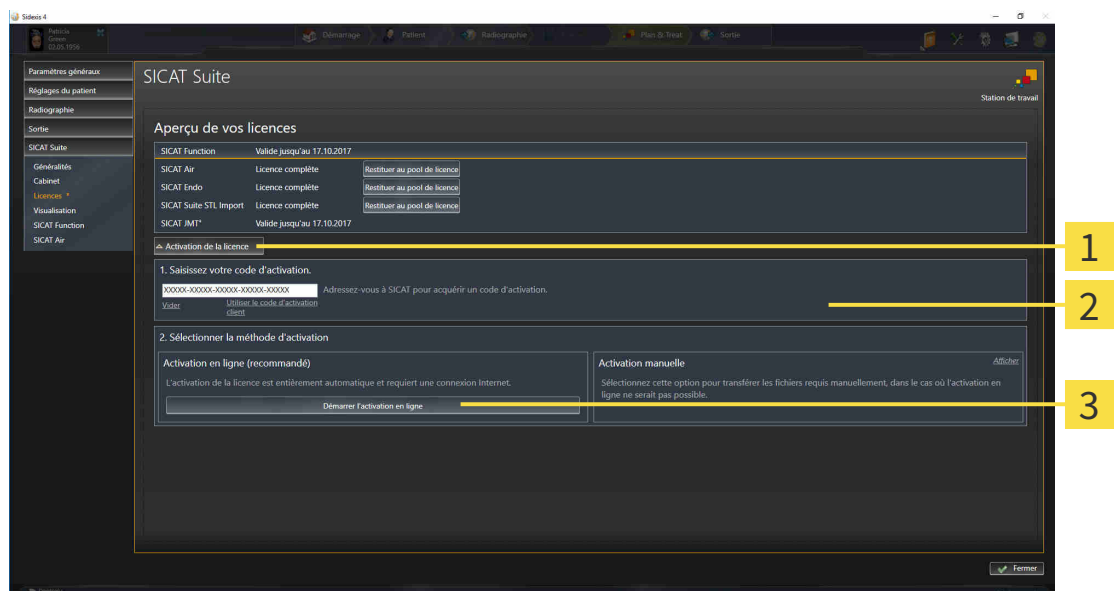

- 1 Bouton **Activation de la licence**
- 2 Zone **Saisissez votre code d'activation**
- 3 Bouton **Démarrer l'activation en ligne**

2. Saisissez votre clé d'activation dans le champ **Saisissez votre code d'activation**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'activation en ligne**.
4. Au cas où une fenêtre **Pare-feu Windows** s'ouvre, autorisez SICAT Suite à accéder à Internet.

► Les licences acquises pour des applications ou des fonctions individuelles installées sont extraites de votre pool de licence et activées dans SICAT Suite sur votre ordinateur actuel.

► La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été activée avec succès**.

REMARQUE**Redémarrage nécessaire**

Lorsque la version d'une application SICAT liée à SIDEXIS nécessite un redémarrage après une modification de licence, SICAT Suite ouvre une fenêtre d'avertissement correspondante.




Pour réactiver une application SICAT, vous pouvez utiliser votre clé d'activation client en cliquant sur le bouton **Utiliser le code d'activation client** dans la zone **Saisissez votre code d'activation**. Pour vider le champ contenant la clé de licence actuelle, vous pouvez cliquer sur le bouton **Vider**.

19.3 ACTIVER DES LICENCES MANUELLEMENT OU SANS CONNEXION INTERNET ACTIVE

REMARQUE **Le dossier patient doit être fermé**
Vous devez fermer le dossier patient actif avant de procéder à des modifications des licences.

Pour activer les licences manuellement ou sans connexion Internet active, procédez de la manière suivante :

- ☑ Il manque une licence activée à au moins une application SICAT ou une fonction individuelle.
 - ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences" [► Page 50 - SIDEXIS 4]*.
1. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur **Activation de la licence**.
 - La zone **Activation de la licence** est développée.
 2. Cliquez sur **Afficher** dans la zone **Activation manuelle**.
 - La zone **Activation manuelle** est développée :

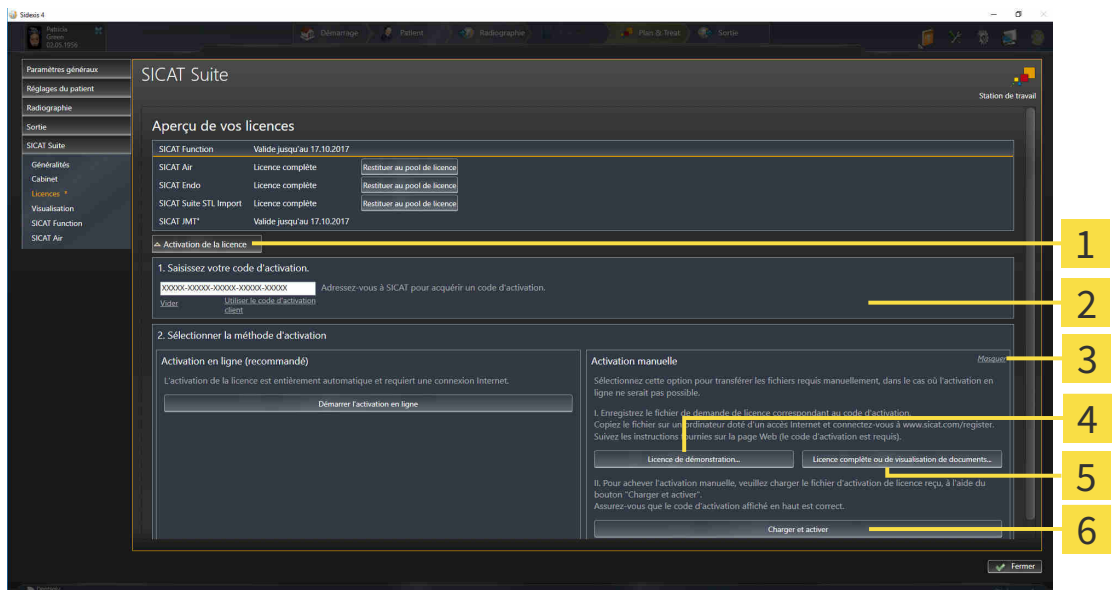

1 Activation de la licence

4 Bouton **Licence de démonstration**

2 Zone **Saisissez votre code d'activation**

5 Bouton **Licence complète ou de visualisation de documents**

3 **Afficher**

6 Bouton **Charger et activer**

3. Pour activer une licence complète, cliquez sur le bouton **Licence complète ou de visualisation de documents**.
4. Pour activer une licence de démonstration, cliquez sur le bouton **Licence de démonstration**.
 - Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
5. Naviguez jusqu'au dossier souhaité pour le fichier de demande de licence, puis cliquez sur **OK**.

- ▶ Un fichier de demande de licence avec l'extension **WibuCmRaC** est généré et enregistré dans le dossier sélectionné.
6. Copiez le fichier de demande de licence sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active, par exemple par l'intermédiaire d'une clé USB.
 7. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.com/register>.
 8. Suivez les instructions fournies sur la page Internet d'activation.
 - ▶ Les licences acquises pour les applications ou les fonctions installées sont extraites de votre pool de licences.
 - ▶ Le serveur de licences SICAT génère un fichier d'activation de licence avec l'extension **WibuCm-RaU**, que vous devez télécharger sur votre ordinateur.
 9. Copiez le fichier d'activation de licence téléchargé sur l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite.
 10. Contrôlez que le code d'activation correct est écrit dans le champ **Saisissez votre code d'activation**.
 11. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur le bouton **Charger et activer**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
 12. Naviguez jusqu'au fichier d'activation de licence, sélectionnez-le et cliquez sur **OK**.
 - ▶ La licence contenue dans le fichier d'activation de licence est installée dans SICAT Suite sur votre ordinateur actuel.
 - ▶ La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été activée avec succès**.

REMARQUE**Redémarrage nécessaire**

Lorsque la version d'une application SICAT liée à SIDEXIS nécessite un redémarrage après une modification de licence, SICAT Suite ouvre une fenêtre d'avertissement correspondante.

19.4 RESTITUER DES LICENCES AU POOL DE LICENCES


REMARQUE

Le dossier patient doit être fermé

Vous devez fermer le dossier patient actif avant de procéder à des modifications des licences.

Procédez de la manière suivante pour désactiver une licence complète et la restituer au pool de licences :

- ☑ Vous avez déjà activé la licence complète d'une application SICAT.
- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences" [► Page 50 - SIDEXIS 4]*.

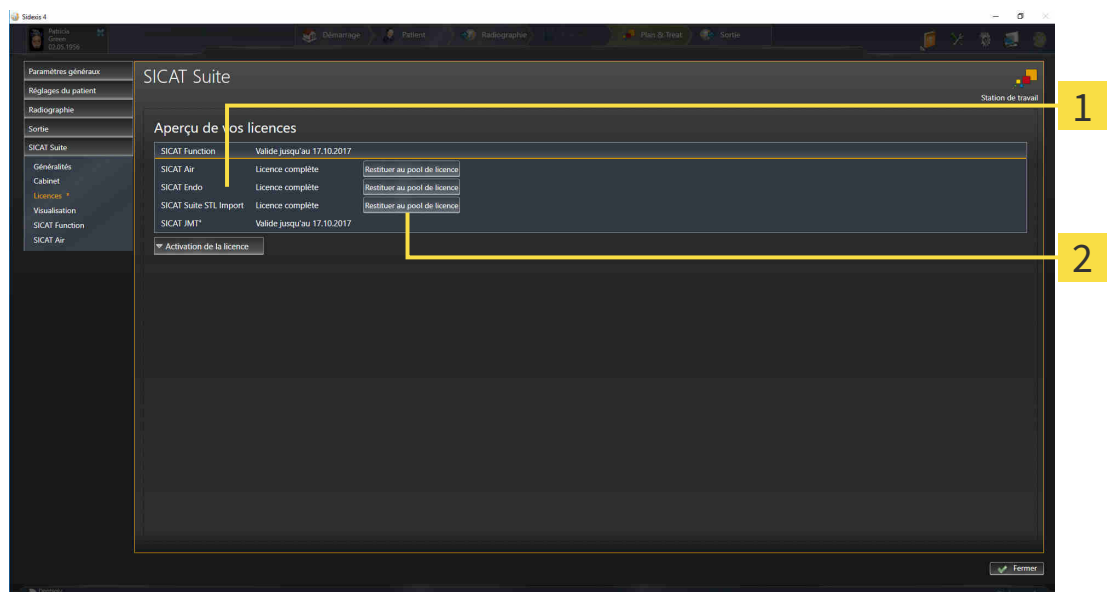

1 Statut de la licence des applications SICAT et fonctions individuelles

2 Bouton **Restituer au pool de licence**

- Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez dans la ligne de l'application SICAT ou de la fonction individuelle souhaitée sur le bouton **Restituer au pool de licence**.
- La licence sélectionnée est restituée à votre pool de licences et redevient disponible pour une nouvelle activation.
- La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été restituée au pool de licences avec succès.**
- Sans licence, une application reste disponible en mode viewer. Si les licences de toutes les applications SICAT ont été restituées au pool de licences, SICAT Suite passe entièrement en mode viewer.

REMARQUE

Redémarrage nécessaire

Lorsque la version d'une application SICAT liée à SIDEXIS nécessite un redémarrage après une modification de licence, SICAT Suite ouvre une fenêtre d'avertissement correspondante.



Si vous souhaitez désactiver une licence sur un ordinateur sans connexion Internet active, veuillez contacter l'assistance SICAT.

19.5 UTILISER DES CODES DE BON D'ÉCHANGE

1. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.com>.
2. Cliquez sur le lien vers SICAT Portal.
 - ▶ SICAT Portal s'ouvre.
3. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez dans la gestion des comptes sur l'entrée relative à la gestion de vos licences.
5. Saisissez votre code de bon d'échange et confirmez-le.
 - ▶ SICAT Portal génère une clé licence et ajoute la clé licence à votre clé d'activation.
6. Démarrez SICAT Suite et activez la licence.


Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences via une connexion Internet active* [▶ Page 51 - SIDEXIS 4] et *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [▶ Page 53 - SIDEXIS 4].



Vous trouverez une aide supplémentaire dans la FAQ dans SICAT Portal.

20 INTERFACE UTILISATEUR DE SICAT FUNCTION

L'interface utilisateur de SICAT Function se compose des éléments suivants :

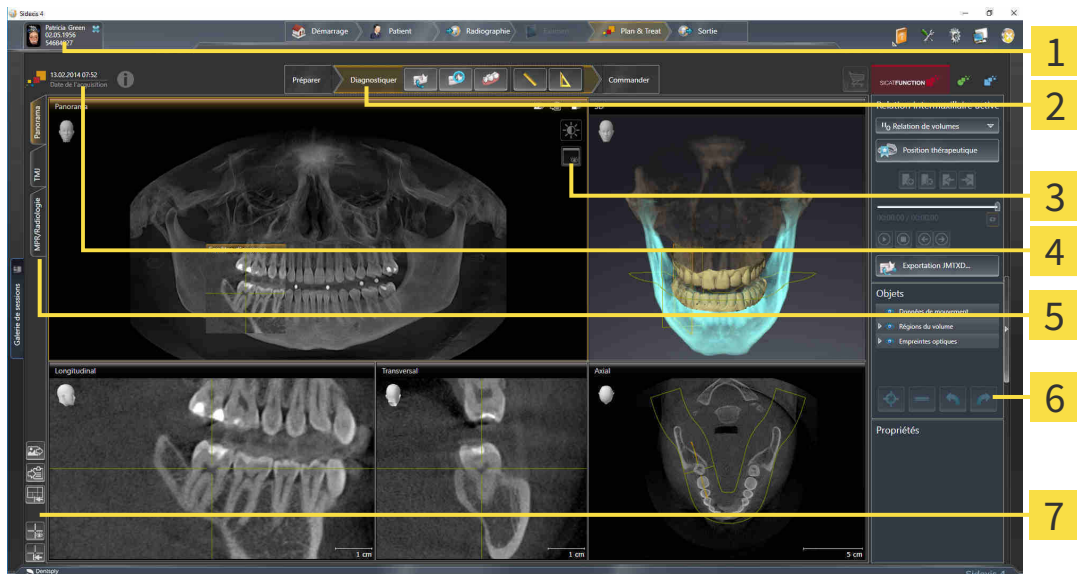

- | | |
|--|--|
| 1 Onglet Dossier patient actif | 5 Boutons de commutation entre les espaces de travail |
| 2 Barre d'outils de flux de travail | 6 Barre d'objets |
| 3 Barre d'outils de vue | 7 Barre d'outils de l'espace de travail |
| 4 Informations sur la radiographie 3D ouverte | |

- L'onglet **Dossier patient actif** affiche les attributs du dossier patient actif.
- La **Barre d'outils de flux de travail** se compose des différentes étapes du flux de travail, qui contiennent les principaux outils du flux de travail de l'application. Il s'agit entre autres d'outils permettant d'ajouter et d'importer des objets de diagnostic et des objets de planification. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 59 - SIDEXIS 4].
- La **Surface de l'espace de travail** est la partie de l'interface utilisateur située en dessous de la **Barre d'outils de flux de travail**. Elle affiche l'espace de travail actif de SICAT Function. Chaque espace de travail contient un ensemble défini de vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Espaces de travail* [► Page 67 - SIDEXIS 4].
- Seule la vue active affiche la **Barre d'outils de vue**. Elle contient des outils permettant d'adapter la représentation de la vue correspondante. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation des vues* [► Page 77 - SIDEXIS 4] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - SIDEXIS 4].
- La **Barre d'objets** comprend des outils servant à la gestion des objets de diagnostic et de planification. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'objets* [► Page 61 - SIDEXIS 4].
- La **Barre d'outils de l'espace de travail** comprend des outils permettant de modifier les réglages généraux des espaces de travail et de toutes les vues qu'ils contiennent, et de documenter le contenu des espaces de travail. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [► Page 85 - SIDEXIS 4], *Réinitialiser les vues* [► Page 88 - SIDEXIS 4], *Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail* [► Page 74 - SIDEXIS 4] et *Créer des captures d'écran d'espaces de travail* [► Page 75 - SIDEXIS 4].

20.1 BARRE D'OUTILS DE FLUX DE TRAVAIL

Dans SICAT Fonction, la **Barre d'outils de flux de travail** est constituée de trois étapes de flux de travail :

1. **Préparer**
2. **Diagnostiquer**
3. **Commander**

RÉDUIRE OU DÉVELOPPER LES ÉTAPES DE FLUX DE TRAVAIL

Vous pouvez réduire ou développer les étapes de flux travail en cliquant dessus.

1. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « PRÉPARER »



L'outil suivant est disponible dans l'étape de flux de travail **Préparer** :



- **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter l'orientation du volume* [▶ Page 103 - SIDEXIS 4] et *Adapter la zone panoramique* [▶ Page 108 - SIDEXIS 4].

2. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « DIAGNOSTIQUER »



Les outils suivants sont disponibles dans l'étape de flux de travail **Diagnostiquer** :



- **Importer et recaler les données de mouvement de la mâchoire** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recaler des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 113 - SIDEXIS 4].



- **Segmenter la mandibule et les condyles** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Segmentation* [► Page 118 - SIDEXIS 4].



- **Importer et recaler les empreintes optiques** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recaler les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4].



- **Ajouter une mesure de distance (D)** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des mesures de distances* [► Page 157 - SIDEXIS 4].



- **Ajouter une mesure d'angle (A)** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des mesures d'angles* [► Page 158 - SIDEXIS 4].

3. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « COMMANDER »




L'outil suivant est disponible dans l'étape de flux de travail **Commander** :



- **Commander la gouttière thérapeutique** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [► Page 166 - SIDEXIS 4].

20.2 BARRE D'OBJETS

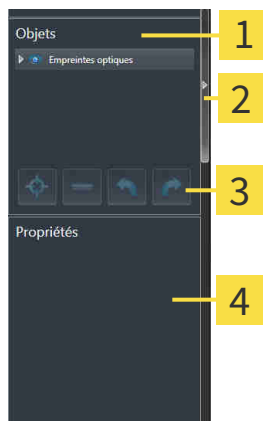

1 Navigateur d'objets

2 Bouton **Masquer la barre d'objets** ou bouton **Afficher la barre d'objets**

3 Barre d'outils d'objet

4 Zone **Propriétés**

La **Barre d'objets** comprend les éléments suivants :

- Le **Navigateur d'objets** affiche une liste classée par catégories de tous les objets de diagnostic et de planification que vous avez ajoutés ou importés à votre étude actuelle. Le **Navigateur d'objets** groupe les objets automatiquement. Le groupe **Mesures**, par exemple, contient tous les objets de mesure. Vous pouvez réduire ou développer les groupes d'objets, activer les objets et les groupes d'objets, et masquer et afficher les objets et les groupes d'objets. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4].
- La **Barre d'outils d'objet** comprend des outils permettant de focaliser des objets, de supprimer des objets ou des groupes d'objets et d'annuler ou de répéter des manipulations d'objets ou de groupes d'objets. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 64 - SIDEXIS 4].
- La zone **Propriétés** affiche des détails sur l'objet actif.


Vous pouvez changer la visibilité de la **Barre d'objets** avec deux boutons sur le côté droit **Barre d'objets**: **Masquer la barre d'objets** et **Afficher la barre d'objets**

Les objets qui sont disponibles dans SICAT Function sont décrits dans le paragraphe *Objets de SICAT Function* [► Page 65 - SIDEXIS 4].

20.3 GESTION DES OBJETS À L'AIDE DU NAVIGATEUR D'OBJETS

RÉDUIRE ET DÉVELOPPER LES GROUPES D'OBJETS

Procédez de la manière suivante pour réduire et développer un groupe d'objets :

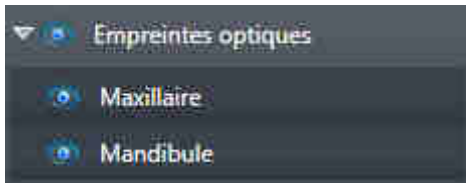

Le groupe d'objets de votre choix est développé.



1. Cliquez à côté du groupe d'objets de votre choix sur l'icône **Réduire**.
 - ▶ Le groupe d'objets est réduit.



2. Cliquez à côté du groupe d'objets de votre choix sur l'icône **Développer**.
 - ▶ Le groupe d'objets est développé.

ACTIVER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS

Certains outils ne sont disponibles que pour les objets ou groupes d'objets actifs.

Procédez de la manière suivante pour activer un objet ou un groupe d'objets :

L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est actuellement désactivé.

- Cliquez sur l'objet ou le groupe d'objets de votre choix.
 - ▶ SICAT Function désactive un objet ou un groupe d'objets précédemment activé.
 - ▶ SICAT Function active l'objet ou le groupe d'objet de votre choix.
 - ▶ SICAT Function met l'objet ou le groupe d'objet en relief en couleur dans le **Navigateur d'objets** et dans les vues.



Vous pouvez également activer certains objets dans les vues 2D en cliquant sur ces objets.

MASQUER ET AFFICHER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS



Cette fonction n'est disponible que pour certains types d'objets.

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher un objet ou un groupe d'objets :

- L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est actuellement affiché.



1. Cliquez à côté de l'objet ou du groupe d'objets de votre choix, sur l'icône **Affiché** ou sur l'icône **Partiellement affiché**.



- ▶ SICAT Function masque l'objet ou le groupe d'objets.
- ▶ SICAT Function affiche l'icône **Masqué** à côté de l'objet ou du groupe d'objets.



2. Cliquez à côté de l'objet ou du groupe d'objets de votre choix, sur l'icône **Masqué**.

- ▶ SICAT Function affiche l'objet ou le groupe d'objets.
- ▶ SICAT Function affiche l'icône **Affiché** à côté de l'objet ou du groupe d'objets.

20.4 GESTION DES OBJETS À L'AIDE DE LA BARRE D'OUTILS D'OBJET



Ces fonctions ne sont disponibles que pour certains types d'objets.

FOCALISER LES OBJETS

Utilisez cette fonction afin de trouver les objets dans les vues.

Procédez de la manière suivante pour focaliser un objet :

- ☑ L'objet voulu est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4].



- Cliquez sur l'icône **Focaliser l'objet actif (F)**.
- SICAT Function déplace le point de focalisation des vues sur l'objet actif.
- SICAT Function affiche l'objet actif dans les vues.



Vous pouvez également focaliser des objets à l'aide d'un double-clic sur ces objets dans le **Navigateur d'objets** ou dans une vue, à l'exception de la vue **3D**.

SUPPRIMER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS

Procédez de la manière suivante pour supprimer un objet ou un groupe d'objets :

- ☑ L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est déjà activé. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4].



- Cliquez sur l'icône **Supprimer un objet actif/groupe actif (Suppr)**.
- SICAT Function supprime l'objet ou le groupe d'objets.

ANNULER ET RÉPÉTER LES MANIPULATIONS D'UN OBJET

Procédez de la manière suivante pour annuler et répéter les dernières manipulations d'un objet ou d'un groupe d'objets :



1. Cliquez sur l'icône **Annuler la dernière manipulation d'un objet/groupe (Ctrl+Z)**.
 - SICAT Function annule la dernière manipulation d'un objet ou d'un groupe.



2. Cliquez sur l'icône **Répéter la manipulation d'un objet/groupe (Ctrl+Y)**.
 - SICAT Function répète la dernière manipulation annulée d'un objet ou d'un groupe.



Les fonctions annuler et répéter les manipulations ne sont disponibles que tant qu'une étude est ouverte dans une application SICAT.

20.5 OBJETS DE SICAT FONCTION

Dans le **Navigateur d'objets**, SICAT Function groupe les objets spécifiques à une application selon les critères suivants :

- **Données de mouvement**
- **Régions du volume**
 - **Mandibule**
- **Empreintes optiques**

DONNÉES DE MOUVEMENTOBJET



Une fois que vous avez importé les données de mouvement de la mâchoire, SICAT Function affiche un objet **Données de mouvement** dans le **Navigateur d'objets**.

RÉGIONS DU VOLUMEOBJET ET MANDIBULE OBJET



Une fois que vous avez segmenté la mâchoire inférieure, SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. L'objet **Régions du volume** contient l'objet **Mandibule**. L'objet **Mandibule** contient les sous-objets suivants :

- **Côté gauche de la mandibule**
- **Côté droit de la mandibule**
- **Secteur antérieur de la mandibule**

Si vous focalisez un des sous-objets, SICAT Function focalise l'objet sélectionné dans toutes les vues 2D.

OBJET EMPREINTES OPTIQUES



Une fois que vous avez importé et enregistré des empreintes optiques, SICAT Function affiche un objet **Empreintes optiques** dans le **Navigateur d'objets**. Un objet **Empreintes optiques** contient les sous-objets suivants :

- **Maxillaire**
- **Mandibule**

Si vous focalisez un des sous-objets, SICAT Function focalise l'objet sélectionné dans toutes les vues 2D.

Lorsque vous supprimez un objet **Maxillaire** ou un objet **Mandibule**, SICAT Function supprime toutes les empreintes optiques disponibles de l'étude.

21 ESPACES DE TRAVAIL

Les applications SICAT représentent des études dans différentes vues et disposent des ensembles de vues dans des espaces de travail.

SICAT Function dispose de trois espaces de travail différents :




- **Panorama**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail Panorama* [▶ Page 68 - SIDEXIS 4].
- **TMJ**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 70 - SIDEXIS 4].
- **MPR/Radiologie**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail MPR/Radiologie* [▶ Page 72 - SIDEXIS 4].

Les actions suivantes sont disponibles pour les espaces de travail et pour les vues qu'ils contiennent :

- *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 73 - SIDEXIS 4].
- *Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail* [▶ Page 74 - SIDEXIS 4].
- *Adaptation des vues* [▶ Page 77 - SIDEXIS 4].
- Il existe des possibilités supplémentaires pour adapter la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 90 - SIDEXIS 4].
- Vous pouvez documenter le contenu d'un espace de travail actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Créer des captures d'écran d'espaces de travail* [▶ Page 75 - SIDEXIS 4].

21.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL PANORAMA

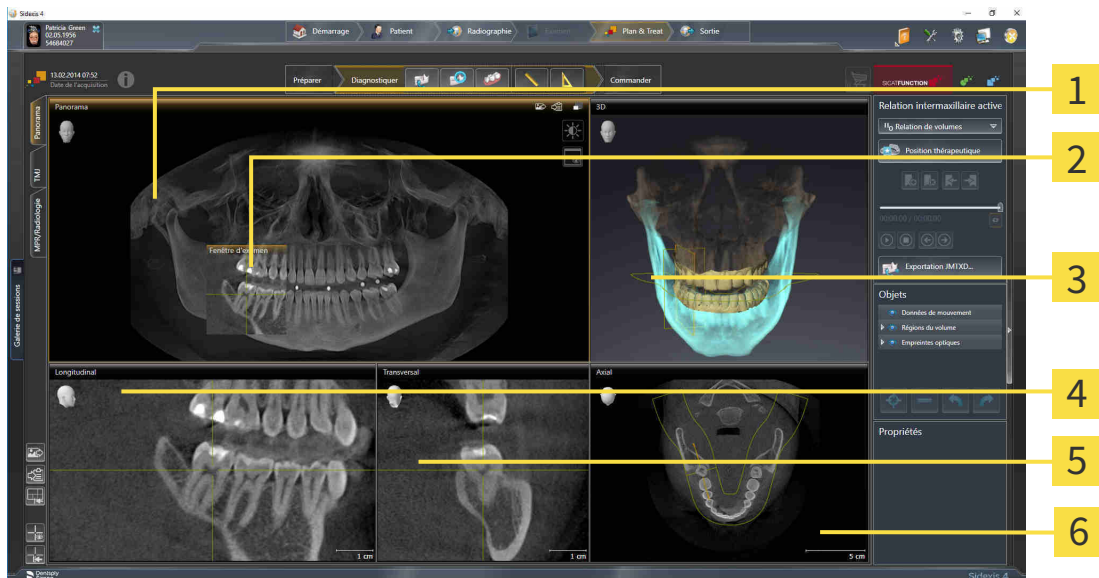

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 4 Longitudinal-Vue |
| 2 Fenêtre d'examen | 5 Transversal-Vue |
| 3 3D-Vue | 6 Axial-Vue |

VUE PANORAMA

La vue **Panorama** correspond à un orthopantomogramme (OPG) virtuel. Elle représente une projection orthogonale sur la courbe panoramique, avec une épaisseur définie. Vous pouvez adapter la courbe panoramique et l'épaisseur aux deux mâchoires. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Adapter la zone panoramique* [► Page 108 - SIDEXIS 4].

FENÊTRE D'EXAMEN

La **Fenêtre d'examen** est incluse dans la vue **Panorama**. Elle apporte la troisième dimension à la vue **Panorama** en visualisant des coupes parallèles à la courbe panoramique. Vous pouvez masquer et afficher la **Fenêtre d'examen**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 86 - SIDEXIS 4].

VUE 3D

La vue **3D** visualise une représentation 3D de l'étude ouverte.

VUE LONGITUDINAL

La vue **Longitudinal** représente des coupes qui sont tangentielles à la courbe panoramique.

VUE TRANSVERSAL


La vue **Transversal** représente des coupes qui sont orthogonales à la courbe panoramique.

VUE AXIAL

Par défaut, la vue **Axial** représente des coupes vues du dessus. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Axial**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [▶ Page 186 - SIDEXIS 4].

Vous trouverez les fonctions des vues sous *Adaptation des vues* [▶ Page 77 - SIDEXIS 4] et *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 90 - SIDEXIS 4].

21.2 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL TMJ

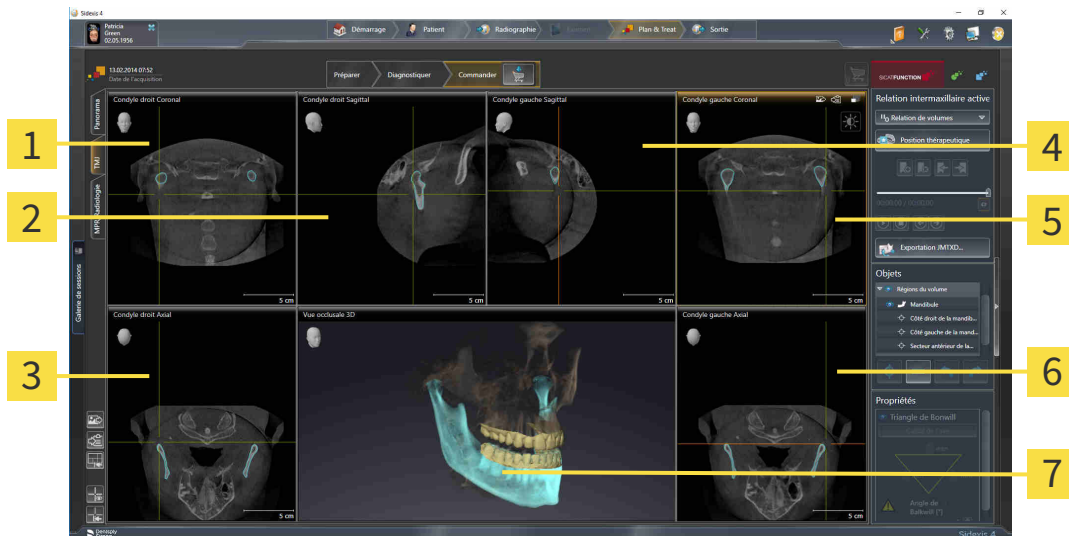


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Condyle droit Coronal-Vue | 5 Condyle gauche Coronal-Vue |
| 2 Condyle droit Sagittal-Vue | 6 Condyle gauche Axial-Vue |
| 3 Condyle droit Axial-Vue | 7 Vue occlusale 3D |
| 4 Condyle gauche Sagittal-Vue | |

Vous pouvez sélectionner les articulations anatomiques individuelles d'un patient dans la zone JMT et les examiner dans les vues. Vous trouverez des informations sur la zone JMT dans *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].

L'espace de travail **TMJ** visualise simultanément le condyle gauche et le condyle droit. Ceci permet une comparaison directe entre les deux articulations temporo-mandibulaires. La comparaison permet d'identifier des dissymétries de mouvement et de morphologie au niveau des articulations temporo-mandibulaires.

SICAT Function Les condyles en mouvement sont repérés différemment dans :

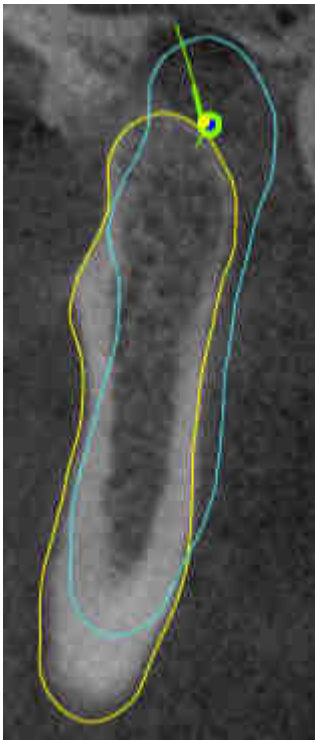


- Les condyles en mouvement dans les vues de coupe sont représentés dans SICAT Function avec un contour bleu.
- La limite de la segmentation dans les vues de coupe est représentée dans SICAT Function par un contour jaune.
- Les condyles en mouvement dans la vue de coupe **3D** sont représentés dans SICAT Function sous forme d'un objet 3D.

Pour faciliter la comparaison de l'ATM droite et de l'ATM gauche, les vues doivent être orientées par rapport au plan médian sagittal (plan de symétrie miroir) de la tête. Pour compenser des erreurs de positionnement pendant la radiographie 3D, utilisez la fonction **Adapter l'orientation du volume**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter l'orientation du volume* [► Page 103 - SIDEXIS 4]. Assurez-vous lors de l'orientation du volume, que les articulations temporo-mandibulaires soient le plus symétriques possibles par rapport au plan médian sagittal.

L'espace de travail **TMJ** offre des options supplémentaires pour l'analyse des données de mouvement de la mâchoire et des régions du volume. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 141 - SIDEXIS 4], *Utilisation du triangle de Bonwill* [► Page 144 - SIDEXIS 4], *Afficher la limite de la segmentation* [► Page 145 - SIDEXIS 4] et *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [► Page 146 - SIDEXIS 4].

21.3 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL MPR/RADIOLOGIE

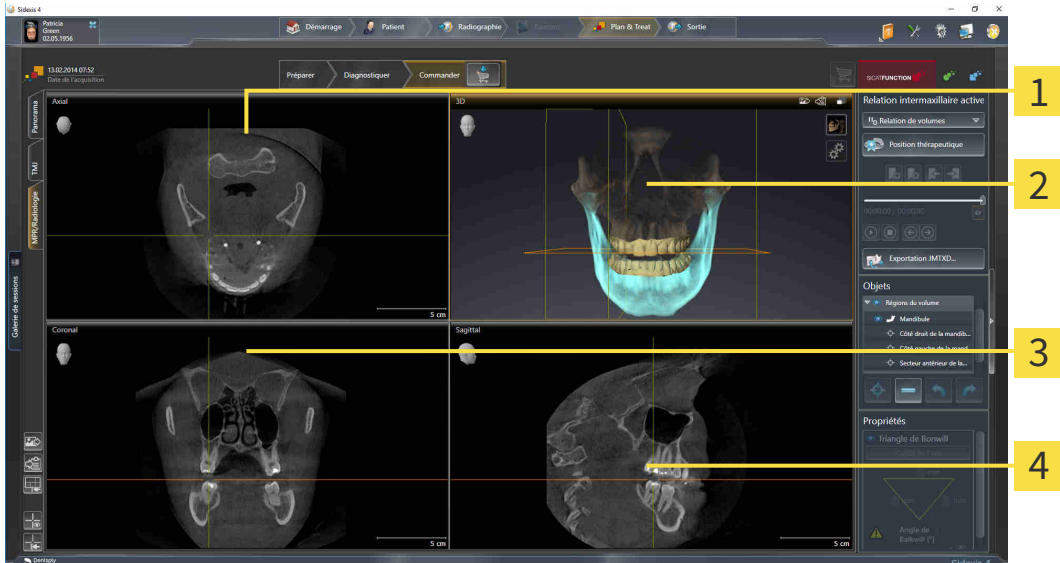

1 Axial-Vue

3 Coronal-Vue

2 3D-Vue

4 Sagittal-Vue

VUE AXIAL

Par défaut, la vue **Axial** représente des coupes vues du dessus. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Axial**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 186 - SIDEXIS 4].

VUE 3D

La vue **3D** visualise une représentation 3D de l'étude ouverte.

VUE CORONAL

La vue **Coronal** représente des coupes vues de devant.

VUE SAGITTAL

Par défaut, la vue **Sagittal** représente des coupes vues de la droite. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Sagittal**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 186 - SIDEXIS 4].

Vous trouverez les fonctions des vues sous *Adaptation des vues* [► Page 77 - SIDEXIS 4] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - SIDEXIS 4].

21.4 CHANGER D'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour changer d'espace de travail actif :



- Cliquez dans le coin supérieur gauche de la surface de l'espace de travail sur l'onglet de l'espace de travail désiré.
- ▶ L'espace de travail sélectionné s'ouvre.

21.5 ADAPTER ET RÉINITIALISER LA PRÉSENTATION DES ESPACES DE TRAVAIL

ADAPTER LA PRÉSENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour adapter la présentation de l'espace de travail actif :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la frontière entre deux ou plusieurs vues.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :



2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez le bouton enfoncé.
3. Déplacez la souris.
 - ▶ La position de la frontière est modifiée.
 - ▶ La taille de toutes les vues limitrophes est modifiée.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la position actuelle de la frontière et les tailles de toutes les vues limitrophes.

RÉINITIALISER LA PRÉSENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour réinitialiser la présentation de l'espace de travail actif :



- Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Réinitialiser la présentation de l'espace de travail actif**.
- ▶ SICAT Function restaure l'espace de travail actif à sa présentation standard. Autrement dit, le logiciel affiche toutes les vues dans leur taille par défaut.

21.6 CRÉER DES CAPTURES D'ÉCRAN D'ESPACES DE TRAVAIL

Vous pouvez copier des captures d'écran des espaces de travail dans le presse-papiers de Windows, à des fins de documentation.

AJOUTER UNE CAPTURE D'ÉCRAN D'UN ESPACE DE TRAVAIL À L'ÉDITION SIDEXIS 4

Procédez de la manière suivante pour ajouter la capture d'un espace de travail à l'édition SIDEXIS 4 :

- ☑ L'espace de travail souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 73 - SIDEXIS 4].



- Cliquez dans la barre d'outils de l'espace de travail sur l'icône **Ajouter la copie d'écran de l'espace de travail actif à l'édition SIDEXIS 4**.

▶ SICAT Function ajoute une capture d'écran de l'espace de travail à l'édition SIDEXIS 4.

COPIER UNE CAPTURE D'ÉCRAN D'UN ESPACE DE TRAVAIL DANS LE PRESSE-PAPIERS DE WINDOWS

Procédez de la manière suivante pour copier une capture d'écran de l'espace de travail dans le presse-papiers de Windows :

- ☑ L'espace de travail souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 73 - SIDEXIS 4].



- Cliquez dans la barre d'outils de l'espace de travail sur l'icône **Copier la copie d'écran de l'espace de travail actif dans le presse-papier**.

▶ SICAT Function copie une capture d'écran de l'espace de travail dans le presse-papiers de Windows.



Vous pouvez coller des captures d'écran du presse-papiers dans de nombreuses applications, par exemple des logiciels de traitement d'image et de traitement de texte. Dans la plupart des applications, le raccourci clavier Ctrl+V est utilisé pour la fonction coller.

22 VUES


Les vues sont contenues dans les espaces de travail. Vous trouverez une description des différents espaces de travail et des vues dans le paragraphe *Espaces de travail* [► Page 67 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez adapter les vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation des vues* [► Page 77 - SIDEXIS 4] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - SIDEXIS 4].

22.1 ADAPTATION DES VUES

Certains outils d'adaptation des vues ne sont disponibles que dans la vue active. L'activation d'une vue est décrite dans le paragraphe *Changer de vue active* [► Page 79 - SIDEXIS 4].

Une vue active contient les éléments suivants :

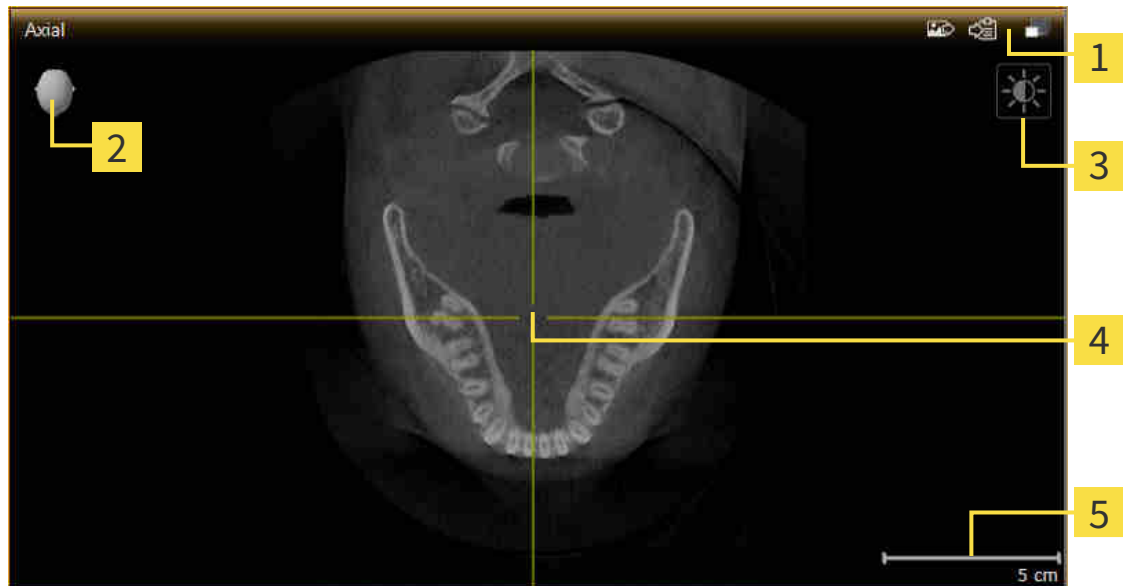

- 1 Barre de titre
- 2 Tête d'orientation
- 3 Barre d'outils de vue
- 4 Réticule
- 5 Échelle

Les vues de coupes 2D affichent des réticules. Les réticules sont des lignes d'intersection avec d'autres vues de coupes. SICAT Function synchronise toutes les vues de coupe entre elles. Autrement dit, tous les réticules indiquent la même position au sein des données de radiographie 3D. Ceci vous permet de corréler les structures anatomiques entre toutes les vues.

La vue **3D** affiche des cadres qui représentent la position actuelle des vues de coupes 2D.

Les actions suivantes sont disponibles pour adapter les vues :

- *Changer de vue active* [▶ Page 79 - SIDEXIS 4]
- *Maximiser et restaurer les vues* [▶ Page 80 - SIDEXIS 4]
- *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 81 - SIDEXIS 4]
- *Zoomer les vues et déplacer des extraits* [▶ Page 83 - SIDEXIS 4]
- *Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D* [▶ Page 84 - SIDEXIS 4]
- *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 85 - SIDEXIS 4]
- *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [▶ Page 86 - SIDEXIS 4]
- *Réinitialiser les vues* [▶ Page 88 - SIDEXIS 4]

Il existe des possibilités supplémentaires pour adapter la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 90 - SIDEXIS 4].


Vous pouvez documenter le contenu d'une vue active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Créer des captures d'écran de vues* [▶ Page 89 - SIDEXIS 4].

22.2 CHANGER DE VUE ACTIVE

Seule la vue active affiche la **Barre d'outils de vue** et la barre de titre.

Procédez de la manière suivante pour activer une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix :

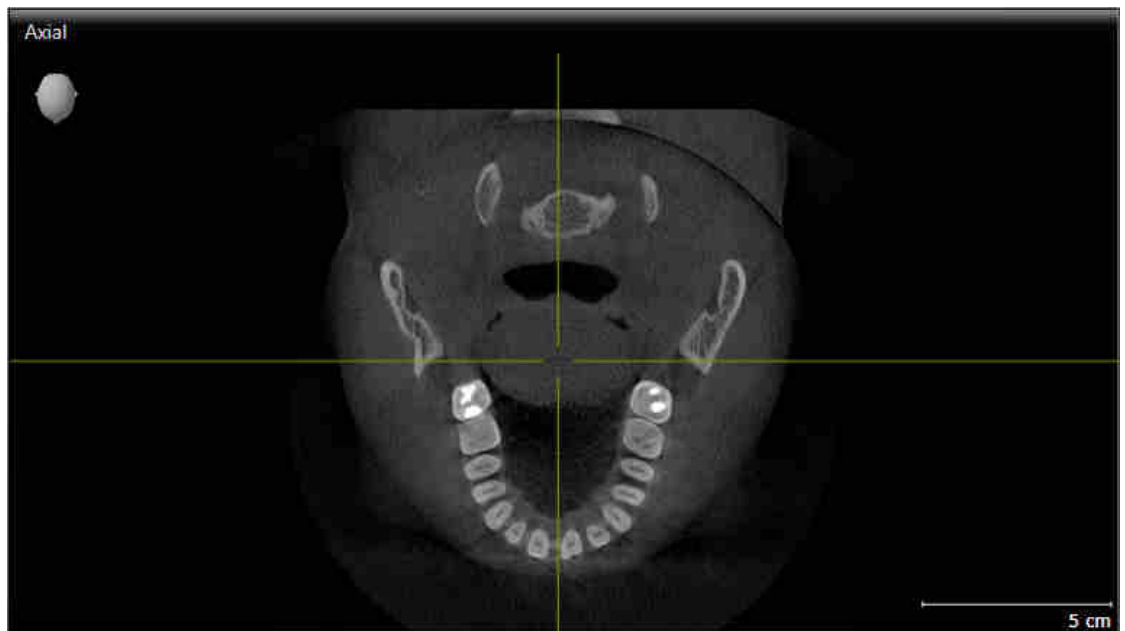

2. Cliquez dans la vue souhaitée.

► SICAT Function active la vue :



La vue activée est reconnaissable à la couleur orange de la barre de titre.

22.3 MAXIMISER ET RESTAURER LES VUES

Procédez de la manière suivante pour maximiser une vue et la restaurer à sa taille précédente :

- ☑ La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 79 - SIDEXIS 4].
- ☑ La vue de votre choix n'est pas maximisée.



1. Dans la barre de titre de la vue concernée, cliquez sur l'icône **Maximiser**.
 - ▶ SICAT Function maximise la vue.



2. Dans la barre de titre de la vue maximisée, cliquez sur l'icône **Restaurer**.
 - ▶ SICAT Function restaure la vue à sa taille précédente.



Les possibilités suivantes sont également disponibles pour maximiser des vues et les restaurer à leur taille précédente :

- Pour maximiser une vue, vous pouvez également double-cliquer sur la barre de titre de la vue concernée.
- Pour restaurer une vue à sa taille précédente, vous pouvez également double-cliquer sur la barre de titre de la vue maximisée.

22.4 ADAPTER ET RESTAURER LE CONTRASTE ET LA LUMINOSITÉ DES VUES 2D

Procédez de la manière suivante pour adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D :

- ☑ La vue 2D de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 79 - SIDEXIS 4].



1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue 2D sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**.

► La fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité** s'ouvre :



2. Amenez le pointeur de la souris sur le curseur **Luminosité**.
3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas.
 - SICAT Function adapte la luminosité de la vue 2D en fonction de la position du curseur **Luminosité**.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la luminosité actuelle de la vue 2D.



5. Amenez le pointeur de la souris sur le curseur **Contraste**.
6. Cliquez avec le bouton gauche de la souris en maintenant le bouton enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas.
 - SICAT Function adapte le contraste de la vue 2D en fonction de la position du curseur **Contraste**.
7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve le contraste actuel de la vue 2D.
8. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité**.
 - La fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité** se ferme.



Pour restaurer les valeurs de contraste et de luminosité par défaut de la vue 2D, vous pouvez cliquer sur l'icône **Réinitialiser la luminosité et le contraste**.



Les réglages de contraste et de luminosité de toutes les vues de coupes 2D sont couplés.

22.5 ZOOMER LES VUES ET DÉPLACER DES EXTRAITS

ZOOMER UNE VUE

La fonction de zoom agrandit ou réduit le contenu d'une vue.

Procédez de la manière suivante pour zoomer une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix.
2. Tournez la molette de la souris vers l'avant.
 - ▶ La vue est agrandie (zoom avant).
3. Tournez la molette de la souris vers l'arrière.
 - ▶ La vue est réduite (zoom arrière).



Une autre solution consiste à cliquer sur le bouton médian de la souris et à déplacer la souris vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

DÉPLACER L'EXTRAIT D'UNE VUE

Procédez de la manière suivante pour déplacer l'extrait d'une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton droit de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :
3. Déplacez la souris.
 - ▶ L'extrait de la vue se déplace en fonction du déplacement du pointeur de la souris.
4. Relâchez le bouton droit de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve l'extrait actuel de la vue.

22.6 NAVIGUER DANS LES COUPES DES VUES DE COUPES 2D

Procédez de la manière suivante pour naviguer dans les coupes dans une vue de coupes 2D :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une flèche bidirectionnelle.
3. Déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.
 - ▶ À l'exception de la coupe **Transversal**, les coupes se déplacent parallèlement.
 - ▶ La coupe **Transversal** se déplace le long de la courbe panoramique.
 - ▶ SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.
 - ▶ SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la coupe actuelle.

22.7 DÉPLACER, MASQUER ET AFFICHER LES RÉTICULES ET LES CADRES

DÉPLACER UN RÉTICULE

Procédez de la manière suivante pour déplacer le réticule dans une vue de coupe 2D :

Tous les réticules et tous les cadres sont affichés.

1. Amenez le pointeur de la souris dans la vue de votre choix, sur le centre du réticule.

▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un réticule :



2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Déplacez la souris.

▶ Le réticule de la vue suit le déplacement de la souris.

▶ SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.

▶ SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.

4. Relâchez le bouton gauche de la souris.

▶ SICAT Function conserve la position actuelle du réticule.



Pour déplacer directement le réticule à la position du pointeur de la souris, vous pouvez également double-cliquer dans une vue 2D.

MASQUER ET AFFICHER LES RÉTICULES ET LES CADRES

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher tous les réticules et tous les cadres :

Tous les réticules et tous les cadres sont affichés.



1. Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Masquer les réticules et les cadres**.

▶ SICAT Function masque les réticules dans toutes les vues de coupes 2D.

▶ SICAT Function masque les cadres dans la vue **3D**.



2. Cliquez sur l'icône **Afficher les réticules et les cadres**.

▶ SICAT Function affiche les réticules dans toutes les vues de coupes 2D.

▶ SICAT Function affiche les cadres dans la vue **3D**.

22.8 DÉPLACER, MASQUER ET AFFICHER LA FENÊTRE D'EXAMEN

DÉPLACER LA FENÊTRE D'EXAMEN

Procédez de la manière suivante pour déplacer la **Fenêtre d'examen** :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 73 - SIDEXIS 4].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée :



1. Dans la vue **Panorama**, amenez le pointeur de la souris sur la barre de titre de la **Fenêtre d'examen**.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une main.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Déplacez la souris.
 - La **Fenêtre d'examen** suit le déplacement de la souris.
 - SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.
 - SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle de la **Fenêtre d'examen**.

MASQUER ET AFFICHER LA FENÊTRE D'EXAMEN



L'icône indiquant si la **Fenêtre d'examen** est affichée ou masquée sert à la fois d'indicateur d'état et de commutateur.

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher la **Fenêtre d'examen** :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 73 - SIDEXIS 4].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée.



1. Dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **Panorama**, cliquez sur l'icône **Masquer la fenêtre d'examen**.

▶ SICAT Function masque la **Fenêtre d'examen**.



2. Dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **Panorama**, cliquez sur l'icône **Afficher la fenêtre d'examen**.

▶ SICAT Function affiche la **Fenêtre d'examen**.

22.9 RÉINITIALISER LES VUES

Procédez de la manière suivante pour réinitialiser toutes les vues :



- Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Réinitialiser les vues**.
- ▶ SICAT Function restaure toutes les vues à leurs valeurs par défaut en ce qui concerne le zoom, le déplacement des extraits, la navigation, le déplacement des réticules et le déplacement de la **Fenêtre d'examen**.
- ▶ SICAT Function réinitialise le sens de vision de la vue **3D** à sa valeur par défaut.

22.10 CRÉER DES CAPTURES D'ÉCRAN DE VUES

Vous pouvez créer des captures d'écran des vues à des fins de documentation, et les éditer de différentes manières :

- en les ajoutant à l'édition SIDEXIS 4,
- en les copiant dans le presse-papiers de Windows.

AJOUTER LA CAPTURE D'ÉCRAN D'UNE VUE À L'ÉDITION SIDEXIS 4

- ☑ Vous avez démarré SICAT Function à partir de SIDEXIS 4.
- ☑ La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 79 - SIDEXIS 4].



- Dans la barre de titre de la vue, cliquez sur l'icône **Ajouter des captures d'écran à l'édition SIDEXIS 4**.

► SICAT Function ajoute une capture d'écran de la vue à l'édition SIDEXIS 4.

COPIER LA CAPTURE D'ÉCRAN D'UNE VUE DANS LE PRESSE-PAPIERS DE WINDOWS

Procédez de la manière suivante pour copier une capture d'écran d'une vue dans le presse-papiers de Windows :

- ☑ La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 79 - SIDEXIS 4].



- Dans la barre de titre de la vue, cliquez sur l'icône **Copier la capture d'écran dans le presse-papiers (Ctrl+C)**.

► SICAT Function copie une capture d'écran de la vue dans le presse-papiers de Windows.



Vous pouvez coller des captures d'écran du presse-papiers dans de nombreuses applications, par exemple des logiciels de traitement d'image et de traitement de texte. Dans la plupart des applications, le raccourci clavier Ctrl+V est utilisé pour la fonction coller.

23 ADAPTATION DE LA VUE 3D

Vous pouvez modifier à tout moment le sens de vision de la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier le sens de vision de la vue 3D* [▶ Page 91 - SIDEXIS 4].

Les actions suivantes sont disponibles pour configurer la vue **3D** :

- *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [▶ Page 95 - SIDEXIS 4]
- *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [▶ Page 96 - SIDEXIS 4]
- *Déplacer l'extrait* [▶ Page 98 - SIDEXIS 4]

23.1 MODIFIER LE SENS DE VISION DE LA VUE 3D

Vous disposez de deux possibilités pour modifier le sens de vision de la vue **3D** :

- Modification interactive
- Sélection du sens de vision par défaut

MODIFIER LE SENS DE VISION DE LA VUE 3D DE MANIÈRE INTERACTIVE

Procédez de la manière suivante pour modifier de manière interactive le sens de vision de la vue **3D** :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue **3D**.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une main.
3. Déplacez la souris.
 - ▶ Le sens de vision change en fonction du déplacement de la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve le sens de vision actuel de la vue **3D**.

SÉLECTION DU SENS DE VISION PAR DÉFAUT

Procédez de la manière suivante pour sélectionner un sens de vision par défaut dans la vue **3D** :



1. Amenez le pointeur de la souris dans le coin supérieur gauche de la vue **3D** sur l'icône Tête d'orientation.
 - ▶ La fenêtre transparente **Sens de vision** s'ouvre :



- ▶ Au centre de la fenêtre transparente **Sens de vision**, la Tête d'orientation mise en relief indique le sens de vision actuel.
2. Cliquez sur l'icône de Tête d'orientation représentant le sens de vision par défaut désiré.
 - ▶ Le sens de vision de la vue **3D** change en fonction de votre choix.
3. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Sens de vision**.
 - ▶ La fenêtre transparente **Sens de vision** se ferme.

23.2 TYPES DE REPRÉSENTATION DE LA VUE 3D

Vous trouverez des informations générales sur la vue **3D** dans *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - *SIDEXIS 4*].

SICAT Function offre deux types de représentation différentes pour la vue **3D** :



- Le type de représentation **Vue d'ensemble** visualise l'ensemble de la radiographie 3D.





- Le type de représentation **Extrait** visualise uniquement un extrait de la radiographie 3D. Cet extrait peut être déplacé.



Pour activer un type de représentation de la vue **3D**, reportez-vous à *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 95 - SIDEXIS 4].

La configuration du type de représentation actif est décrite sous *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [► Page 96 - SIDEXIS 4].

23.3 COMMUTER LE TYPE DE REPRÉSENTATION DE LA VUE 3D




Tous les types de représentation sont disponibles dans tous les espaces de travail.

Procédez de la manière suivante pour commuter le type de représentation de la vue **3D** :

- ☑ La vue **3D** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 79 - *SIDEXIS 4*].

1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **3D** sur l'icône **Commuter le type de représentation**.

► La fenêtre transparente **Commuter le type de représentation** s'ouvre :

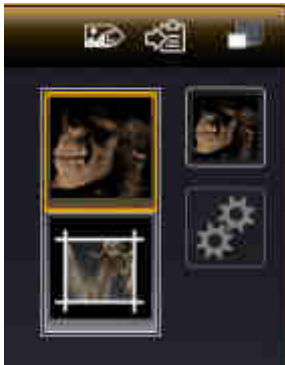

2. Cliquez sur l'icône du type de représentation souhaité.
 - SICAT Function active le type de représentation désiré.
 3. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Commuter le type de représentation**.
- La fenêtre transparente **Commuter le type de représentation** se ferme.

23.4 CONFIGURER LE TYPE DE REPRÉSENTATION ACTIF DE LA VUE 3D



Seuls les types de représentation configurables affichent l'icône **Configurer le type de représentation actif**. La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** visualise uniquement les réglages qui s'appliquent au type de représentation actif.

Procédez de la manière suivante pour configurer le type de représentation actif de la vue **3D** :

- ☑ La vue **3D** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 79 - SIDEXIS 4].
- ☑ Le type de représentation souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 95 - SIDEXIS 4].
- ☑ Le type de représentation actif est configurable.



1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **3D** sur l'icône **Configurer le type de représentation actif**.

► La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** s'ouvre :



2. Déplacez les curseurs de votre choix.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de la position des curseurs.
3. S'il est disponible, cliquez sur le symbole de la flèche à côté de **Réglages avancés**.
 - La zone **Réglages avancés** est développée.
4. Cochez ou décochez les cases disponibles.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de l'état des cases à cocher.
5. Déplacez les curseurs de votre choix.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de la position des curseurs.

6. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif**.

► La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** se ferme.



Vous pouvez réinitialiser les réglages aux valeurs par défaut en cliquant sur le bouton **Réinitialiser la configuration du type de représentation actif au réglage par défaut**.



Pour enregistrer les réglages actuels en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer la configuration du type de représentation actif comme réglage par défaut**.



S'il est disponible, déplacez le curseur **Vitesse de représentation** vers la gauche dans le cas d'ordinateurs lents.

23.5 DÉPLACER L'EXTRAIT


Vous trouverez des informations générales sur la vue **3D** dans *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - *SIDEXIS 4*].

Le type de représentation **Extrait** vous permet de masquer des parties du volume dans la vue **3D**. SICAT Function ne représente alors qu'une tranche extraite du volume, dont la position dans SICAT Function est synchronisée avec le réticule. Procédez de la manière suivante pour déplacer la tranche extraite du volume :

- Vous avez déjà activé le type de représentation **Extrait**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 95 - *SIDEXIS 4*].



- Naviguez dans la vue **Axial**, **Coronal** ou **Sagittal** jusqu'à la coupe souhaitée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D* [▶ Page 84 - SIDEXIS 4].
- ▶ SICAT Function déplace l'extrait en fonction de la coupe sélectionnée :

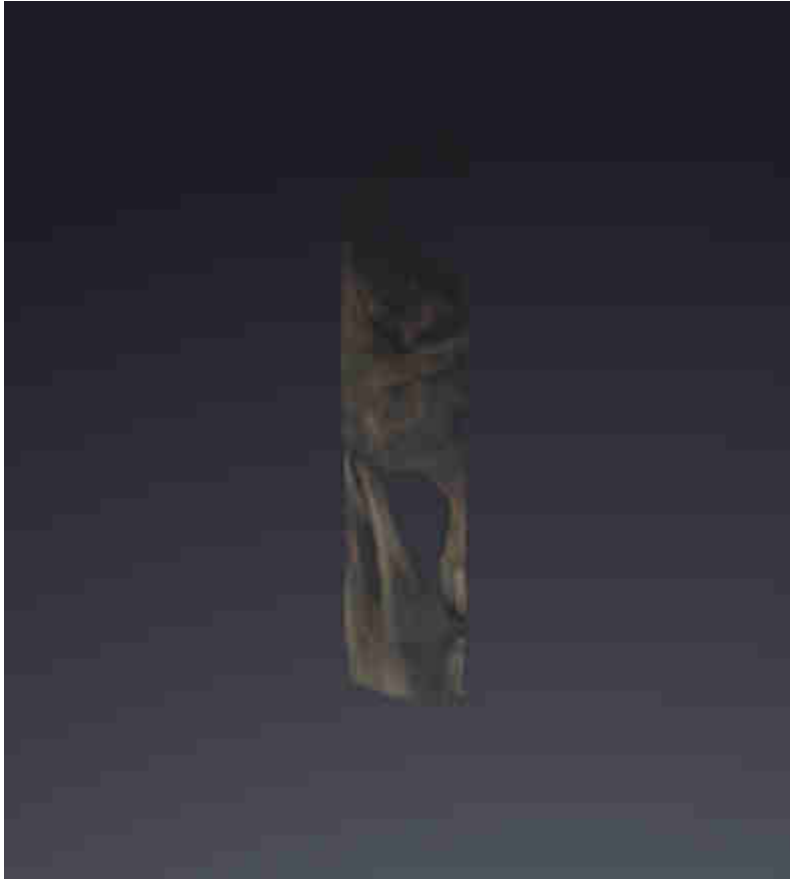

24 ORIENTATION DU VOLUME ET ZONE PANORAMIQUE



Si une adaptation de l'orientation du volume s'avère nécessaire, effectuez cette adaptation au début de votre travail sur la radiographie 3D. Si vous adaptez l'orientation du volume ultérieurement, vous serez éventuellement obligé de refaire en partie votre diagnostic ou votre planification.

ORIENTATION DU VOLUME

Vous pouvez adapter l'orientation du volume pour toutes les vues en tournant le volume autour des trois axes principaux. Ceci peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants :


- Positionnement non optimal du patient lors de la radiographie 3D
- Orientation en fonction du cas d'application, p. ex. orientation des coupes axiales parallèle à l'horizontale de Francfort ou au plan d'occlusion
- Optimisation de la vue panoramique

Si vous adaptez l'orientation du volume dans SICAT Function, toutes les autres applications SICAT reprennent vos adaptations.

Pour adapter l'orientation du volume, reportez-vous au paragraphe *Adapter l'orientation du volume* [▶ Page 103 - SIDEXIS 4].

ZONE PANORAMIQUE

SICAT Function calcule la vue **Panorama** sur la base du volume et de la zone panoramique. Pour optimiser la vue **Panorama**, il convient d'adapter la zone panoramique aux deux maxillaires du patient. Cette opération est importante pour l'efficacité du diagnostic et de la planification du traitement.

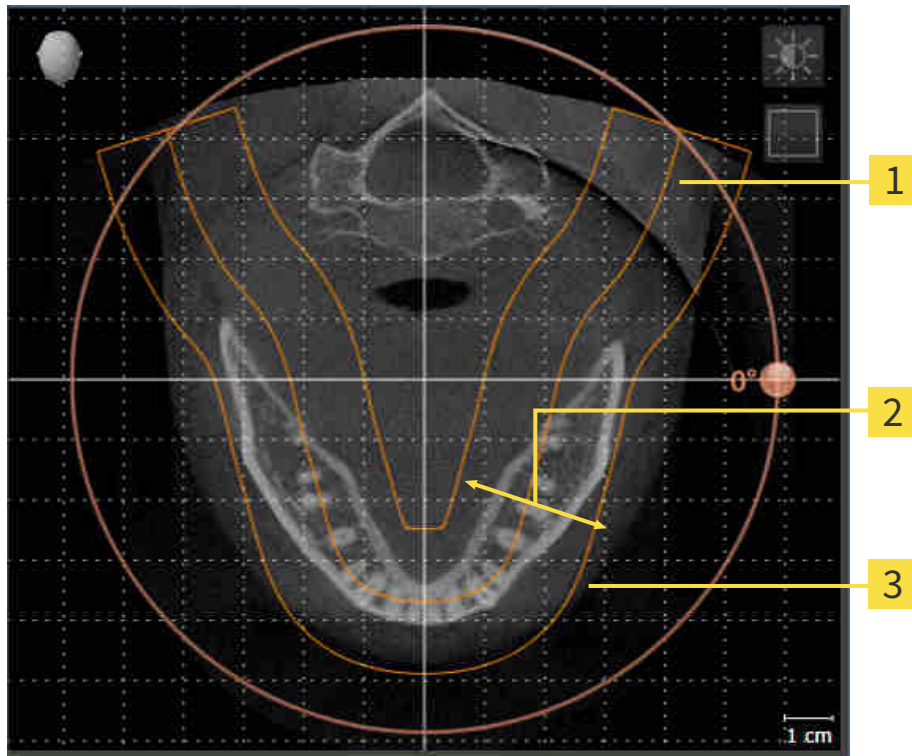

1 Courbe panoramique

2 Épaisseur

3 Zone panoramique

La zone panoramique est définie par les deux composants suivants :

- Forme et position de la courbe panoramique
- Épaisseur de la zone panoramique

Pour une adaptation optimale de la zone panoramique, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies :

- La zone panoramique doit contenir l'intégralité des dents des deux mâchoires
- La zone panoramique doit être aussi fine que possible.

Si vous adaptez la zone panoramique dans SICAT Function, toutes les autres applications SICAT reprennent vos adaptations.


Pour adapter la zone panoramique, reportez-vous au paragraphe *Adapter la zone panoramique* [► Page 108 - SIDEXIS 4].

SYNCHRONISATION DES DONNÉES ENTRE SICAT FUNCTION ET SIDEXIS 4

SICAT Function et SIDEXIS 4 synchronisent l'orientation du volume et la zone panoramique dans les deux sens. Les restrictions suivantes s'appliquent :

- SICAT Function prend uniquement en charge les rotations de l'orientation du volume jusqu'à 30 degrés maxi.
- Lorsque la synchronisation de l'orientation du volume a un impact sur des objets de diagnostic déjà ajoutés et basés sur une autre orientation du volume, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement. La fenêtre d'avertissement vous informe sur les répercussions exactes de la synchronisation et vous pouvez choisir entre les options suivantes :
 - **Synchroniser**
 - **Pas maintenant**
 - **Jamais** pour la radiographie 3D actuelle et l'orientation du volume actuel dans SIDEXIS 4
- Lorsque la synchronisation de la zone panoramique a un impact sur des objets de diagnostic ou de planification déjà ajoutés et basés sur une autre zone panoramique, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement. Vous pouvez choisir entre deux options dans la fenêtre d'avertissement.
 - **OK** - SICAT Function effectue la synchronisation et enlève les objets.
 - **Annuler** - SICAT Function n'effectue pas la synchronisation et conserve les objets.
- SICAT Function prend uniquement en charge la courbe panoramique standard de SIDEXIS 4, pas le décalage individuel de points.
- SICAT Function prend uniquement en charge les épaisseurs de courbe panoramique d'au moins 10 mm.
- SICAT Function prend uniquement en charge les courbes panoramiques que vous n'avez pas tournées dans SIDEXIS 4.

Si au moins une de ces restrictions s'applique, SICAT Function et SIDEXIS 4 cessent de synchroniser l'orientation du volume et la zone panoramique ou seulement la zone panoramique.

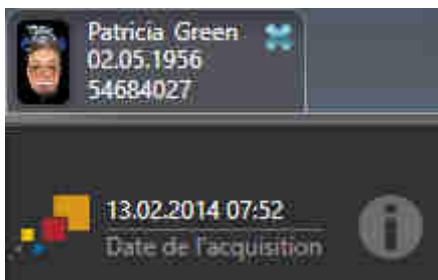

SICAT Function Dans ce cas, affiche une icône d'information à côté des informations relatives à la radiographie 3D actuelle. Si vous déplacez le pointeur de la souris sur cette icône d'information, vous obtenez des informations sur les données qui ne sont plus synchronisées et sur les actions à effectuer pour rétablir une synchronisation.

24.1 ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME

Vous trouverez des informations générales sur l'orientation du volume dans *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 100 - SIDEXIS 4].

L'adaptation de l'orientation du volume se compose des étapes suivantes :

- Ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**
- Tourner le volume dans la vue **Coronal**
- Tourner le volume dans la vue **Sagittal**
- Tourner le volume dans la vue **Axial**


OUVRIR LA FENÊTRE "ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME ET LA ZONE PANORAMIQUE"

☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



- Cliquez sur l'icône **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**.

► La fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** s'ouvre :

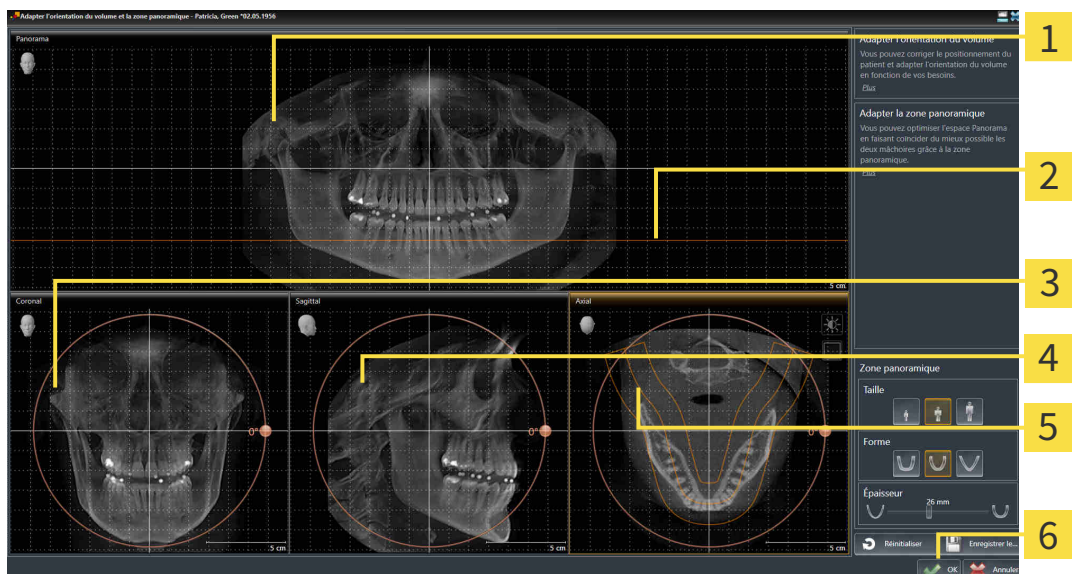

1 Panorama-Vue

2 Ligne de référence axiale

3 CoronalVue avec bouton de réglage **Rotation**


4 SagittalVue avec bouton de réglage **Rotation**

5 AxialVue avec bouton de réglage **Rotation**

6 Bouton **OK**

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE CORONAL

1. Activez la vue **Coronal** :

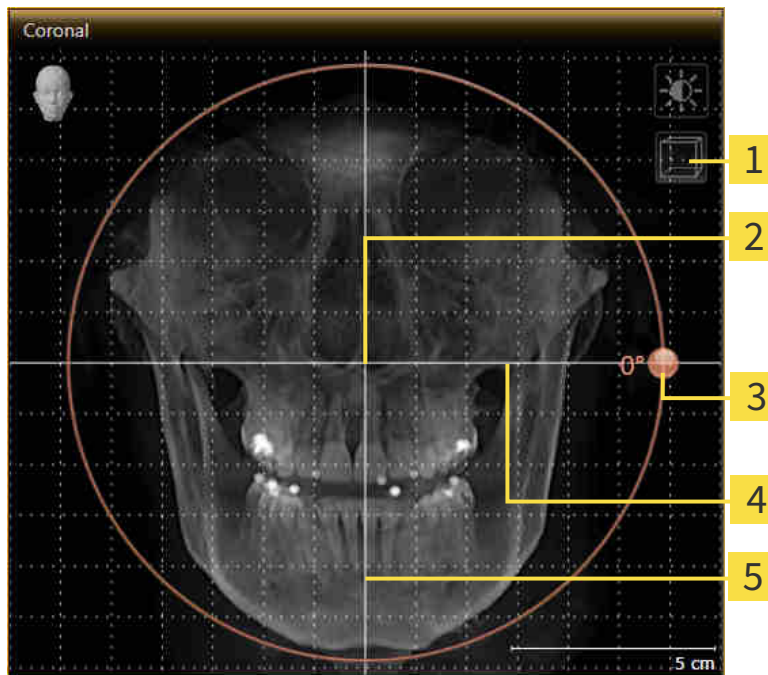


- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Activer le mode coupes ou symbole Activer le mode projection | 4 Ligne de référence horizontale |
| 2 Centre de rotation | 5 Ligne de référence verticale |
| 3 Rotation Bouton de réglage | |

2. Assurez-vous que le mode projection est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.
3. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
4. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
5. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Coronal** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
6. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE SAGITTAL

1. Activez la vue **Sagittal** :

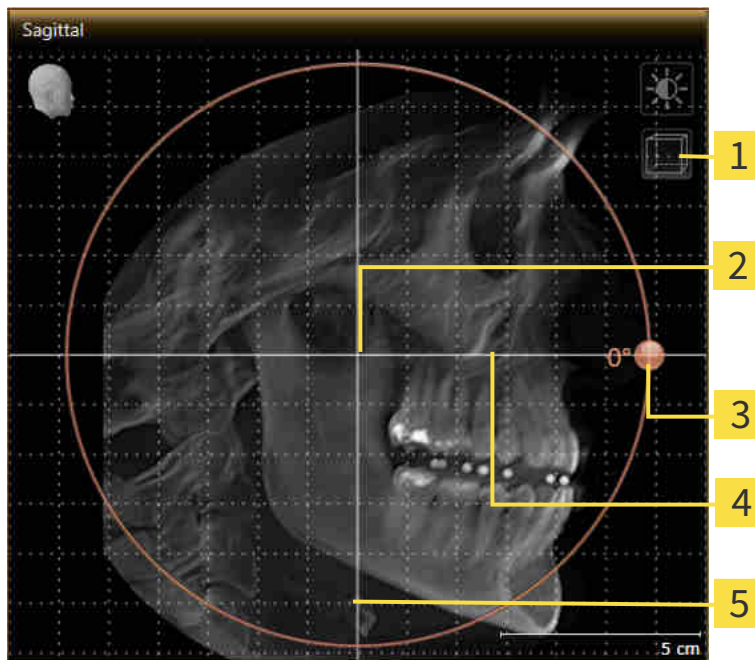


- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Activer le mode coupes ou symbole Activer le mode projection | 4 Ligne de référence horizontale |
| 2 Centre de rotation | 5 Ligne de référence verticale |
| 3 Rotation Bouton de réglage | |

2. Assurez-vous que le mode projection est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.
3. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
4. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
5. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Sagittal** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
6. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE AXIAL

1. Activez la vue **Axial** :

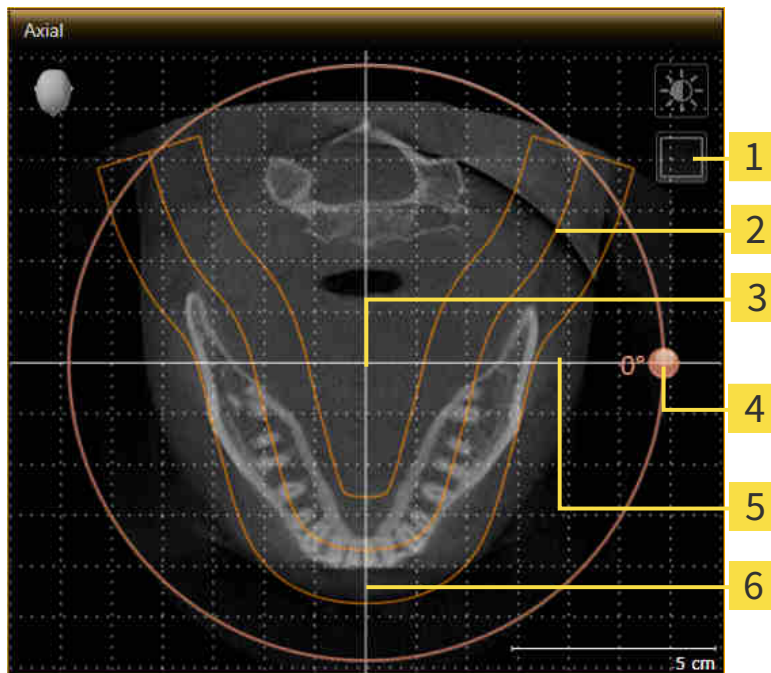

- | | |
|---|--|
| 1 Symbole Activer le mode projection ou symbole Activer le mode coupes | 4 Rotation Bouton de réglage |
| 2 Zone panoramique | 5 Ligne de référence horizontale |
| 3 Centre de rotation | 6 Ligne de référence verticale |

2. Assurez-vous que le mode coupes est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes**.
3. Naviguez jusqu'à une coupe contenant les racines des dents mandibulaires, par exemple en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la ligne de référence axiale dans la vue panoramique et en déplaçant la souris vers le haut ou vers le bas tout en maintenant le bouton gauche enfoncé.
4. Si nécessaire, déplacez la zone panoramique dans la vue **Axial** en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la zone panoramique et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. SICAT Function déplace le centre de rotation, la ligne de référence horizontale et la ligne de référence verticale en conséquence.
5. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
6. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
7. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Axial** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
8. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la zone panoramique, de ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

9. Pour enregistrer vos adaptations, cliquez sur **OK**.
 - ▶ Si l'adaptation du volume a des répercussions sur des objets existants dans des applications SICAT, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement qui vous informe sur ces conséquences exactes.
10. Si vous souhaitez malgré cela effectuer l'orientation du volume, cliquez dans la fenêtre d'avertissement sur le bouton **Adapter**.
 - ▶ SICAT Function enregistre l'orientation du volume adaptée et représente le volume dans les autres vues avec l'orientation correspondante.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D en activant la vue souhaitée et en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 81 - SIDEXIS 4].
- Vous pouvez zoomer des vues. SICAT Function synchronise le zoom entre les vues, sauf la vue **Axial**.
- Pour réinitialiser l'orientation du volume et la zone panoramique, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Pour enregistrer l'orientation actuelle du volume et la zone panoramique actuelle en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer le réglage par défaut**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

24.2 ADAPTER LA ZONE PANORAMIQUE

Vous trouverez des informations générales sur la zone panoramique dans *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 100 - SIDEXIS 4].

L'adaptation de la zone panoramique se compose des étapes suivantes :


- Ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**
- Adapter la position de coupe de la vue **Axial**
- Déplacer la zone panoramique
- Tourner le volume dans la vue **Axial**
- **Taille** Adapter la **Forme** et l'**Épaisseur** de la zone panoramique

OUVRIRE LA FENÊTRE "ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME ET LA ZONE PANORAMIQUE"

☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



- Cliquez sur l'icône **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**.
- La fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** s'ouvre :

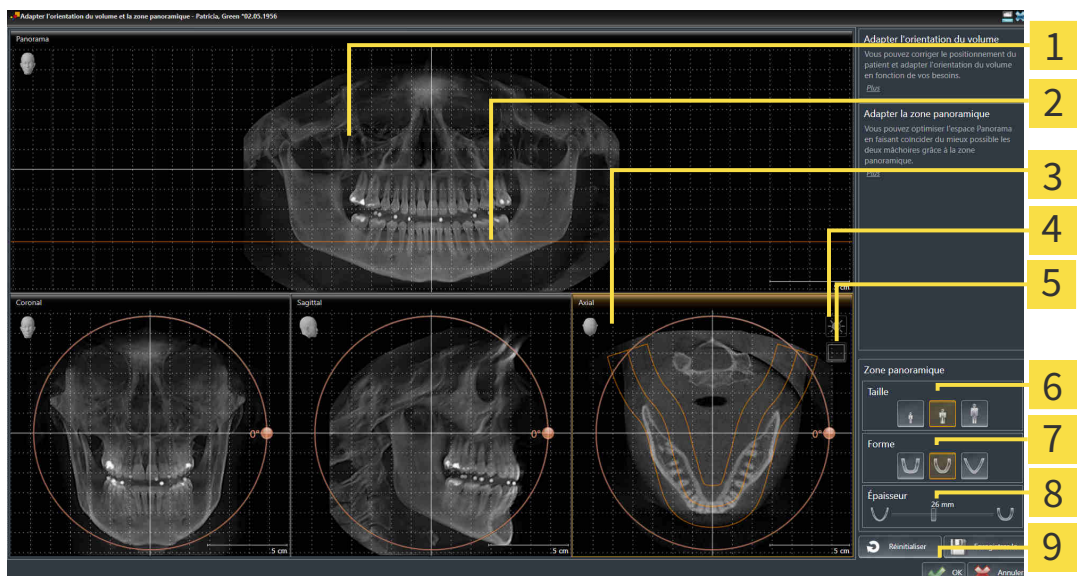

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 6 Taille-Boutons |
| 2 Ligne de référence axiale | 7 Forme-Boutons |
| 3 AxialVue avec curseur Rotation | 8 ÉpaisseurCurseur |
| 4 Symbole Adapter le contraste et la luminosité | 9 Bouton OK |
| 5 Symbole Activer le mode projection ou symbole Activer le mode coupes | |

ADAPTER LA POSITION DE COUPE DE LA VUE AXIAL



1. Assurez-vous que le mode coupe est activé dans la vue **Axial**. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes**.
2. Dans la vue **Panorama**, amenez le pointeur de la souris sur la ligne de référence axiale. La ligne de référence axiale représente la position de coupe actuelle de la vue **Axial**.
3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
4. Déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.
 - ▶ La coupe de la vue **Axial** est adaptée en fonction de la position de la ligne de référence axiale dans la vue **Panorama**.
5. Lorsque la ligne de référence axiale se trouve sur les racines des dents mandibulaires, relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ La vue **Axial** conserve la coupe actuelle.

DÉPLACER LA ZONE PANORAMIQUE

1. Dans la vue **Axial**, déplacez le pointeur de la souris sur la zone panoramique.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :
3. Déplacez la souris.
 - ▶ SICAT Fonction déplace la zone panoramique en fonction de la position du pointeur de la souris.
4. Lorsque la courbe centrale de la zone panoramique suit le tracé des racines des dents de la mandibule, relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ La zone panoramique conserve sa position actuelle.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE AXIAL

1. Dans la vue **Axial**, amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - ▶ SICAT Fonction tourne alors le volume dans la vue **Axial** en suivant un cercle autour du centre de rotation et adapte les autres vues en conséquence.
4. Lorsque le tracé des racines des dents de la mandibule suit la courbe centrale de la zone panoramique, relâchez le bouton gauche de la souris.

ADAPTER LA TAILLE, LA FORME ET L'ÉPAISSEUR DE LA ZONE PANORAMIQUE



1. Sélectionnez la **Taille** de la zone panoramique la plus adaptée à la mandibule du patient en cliquant sur le bouton **Taille** correspondant.



2. Sélectionnez la **Forme** de la zone panoramique la plus adaptée à la mandibule du patient en cliquant sur le bouton **Forme** correspondant.



3. Assurez-vous que le mode projection est activé dans la vue **Axial**. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.



4. Sélectionnez l'**Épaisseur** de la zone panoramique en déplaçant le curseur **Épaisseur**. Assurez-vous que la zone panoramique contient l'intégralité des dents des deux mâchoires. Maintenez l'épaisseur aussi faible que possible.

5. Pour enregistrer vos adaptations, cliquez sur **OK**.

► SICAT Function enregistre l'orientation du volume et la zone panoramique adaptées et représente la vue **Panorama** en conséquence.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D en activant la vue souhaitée et en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [► Page 81 - SIDEXIS 4].
- Vous pouvez zoomer des vues. SICAT Function synchronise le zoom entre les vues, sauf la vue **Axial**.
- Pour réinitialiser l'orientation du volume et la zone panoramique, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Pour enregistrer l'orientation actuelle du volume et la zone panoramique actuelle en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer le réglage par défaut**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

25 DONNÉES DE MOUVEMENT

Les mouvements et les positions de la mâchoire propres au patient fournissent des informations sur la dynamique de mastication du patient. Vous pouvez utiliser ces informations pour l'analyse et le diagnostic du patient. En outre, vous pouvez intégrer ces données dans la planification thérapeutique du patient.

SICAT Function visualise les mouvements et les positions de la mâchoire propres au patient. L'application prend en charge les sources suivantes de données de mouvement de la mâchoire :

- Données de mouvement d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire (JMT)
- Positions statiques d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire
- Positions du mordu buccal prises avec une caméra intra-orale

Vous trouverez une liste des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles dans le paragraphe *Appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles* [► Page 112 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez importer les positions du mordu buccal avec les empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Empreintes optiques* [► Page 124 - SIDEXIS 4].

En plus de l'importation des données de mouvement de la mâchoire, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour préparer la représentation de ces données. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Flux de travail standard de SICAT Function* [► Page 35 - SIDEXIS 4].

Une fois toutes les données nécessaires préparées, les actions suivantes relatives aux données de mouvement de la mâchoire sont disponibles :

- *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4]
- *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 138 - SIDEXIS 4]
- *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 139 - SIDEXIS 4]
- *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 140 - SIDEXIS 4]

Précision de la représentation pour les données de mouvement de la mâchoire < 0,6 mm

25.1 APPAREILS D'ACQUISITION DU MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE COMPATIBLES



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination n'est pas appropriée peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination est conforme à l'utilisation des données de mouvement de la mâchoire par SICAT Function.



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire non pris en charge ou d'appareils d'enregistrement non compatibles peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des données de mouvement de la mâchoire qui ont été acquises avec une combinaison supportée d'un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire (par exemple SICAT JMT*) et d'un appareil de recalage compatible (par exemple SICAT Fusion Bite).

Assurez-vous d'acquérir les données de mouvement de la mâchoire uniquement avec un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatible combiné à un appareil de recalage supporté. Importez exclusivement dans SICAT Function des données de mouvement de la mâchoire provenant d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles. Vous pouvez uniquement importer dans SICAT Function des données de mouvement acquises avec des appareils qui prennent en charge le format SICAT JTI, interface V1.0.

SICAT Function supporte actuellement les combinaisons suivantes d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire et d'appareils d'enregistrement :

- SICAT JMT* en combinaison avec un SICAT Fusion Bite, fabricant : SICAT GmbH & Co. KG, Brunnenallee 6, D-53177 Bonn

25.2 IMPORTER ET RECALER DES DONNÉES DE MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE D'APPAREILS DÉDIÉS



ATTENTION

L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



ATTENTION

Des appareils inadaptés pour les données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données de mouvement de la mâchoire d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



ATTENTION

Une acquisition incorrecte des données de mouvement de la mâchoire et des radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que les données de mouvement de la mâchoire et les radiographies 3D ont été acquises conformément aux instructions des fabricants des appareils. Utilisez le type de corps de référence indiqué.



ATTENTION

Des données de mouvement de la mâchoire qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données de mouvement de la mâchoire correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données de mouvement de la mâchoire peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données de mouvement de la mâchoire importées.



ATTENTION

Une qualité, une précision et une résolution insuffisantes des données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données de mouvement de la mâchoire présentant une qualité, une résolution et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou une qualité insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec du mécanisme de détection des marqueurs et du corps de référence. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant la détection correcte des marqueurs et du corps de référence.



Une position, un type et une orientation incorrects du corps de référence peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Après la détection du corps de référence par l'assistant JTM, contrôlez la position, le type et l'orientation corrects du corps de référence en tenant compte des radiographies 3D.



Un recalage incorrect des données de mouvement de la mâchoire sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données de mouvement de la mâchoire recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



Afin de garantir le recalage correct des données de mouvement de la mâchoire, SICAT recommande d'utiliser des données de radiographie 3D avec les paramètres suivants :

1. Épaisseur de coupe inférieure à 0,7 mm
2. Taille des voxels inférieure à 0,7 mm dans les trois dimensions



Avant d'importer dans SICAT Function les données de mouvement de la mâchoire acquises, vous devez exporter ces données à partir du logiciel de l'appareil d'acquisition des données de mouvement de la mâchoire. L'exportation de fichiers appropriés pour SICAT Function est décrite dans la notice d'instruction de l'appareil d'acquisition des données de mouvement de la mâchoire.



Si l'étude ouverte contient des données de mouvement de la mâchoire déjà recalées, vous devez confirmer le fait que SICAT Function supprime ces données lorsque vous rouvrez l'assistant **Importer et recalage des données de mouvement de la mâchoire**.



Pendant la procédure d'importation des données de mouvement de la mâchoire, vous devez marquer trois marqueurs sphériques dans la vue **Axial** de l'assistant **Importer et recalage des données de mouvement de la mâchoire**, afin que SICAT Function puisse les détecter ensuite.


Vous trouverez des informations générales sur les données de mouvement de la mâchoire dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 111 - SIDEXIS 4].

Procédez de la manière suivante pour importer et recalage des données de mouvement de la mâchoire :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 59 - SIDEXIS 4].



1. Cliquez sur l'icône **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Dans l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - ▶ La fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** s'ouvre.
3. Sélectionnez dans la fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** le fichier des données de mouvement de la mâchoire désiré puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - ▶ La fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** se ferme et SICAT Function reporte le chemin du fichier des données de mouvement de la mâchoire désiré dans le champ **Chemin**.
 - ▶ La vue **Fourchette occlusale** affiche un aperçu de la fourchette occlusale qui a été utilisée pendant l'acquisition des données de mouvement de la mâchoire.
 - ▶ La zone **Patient** et la zone **Acquisition** affichent des informations du fichier des données de mouvement de la mâchoire :

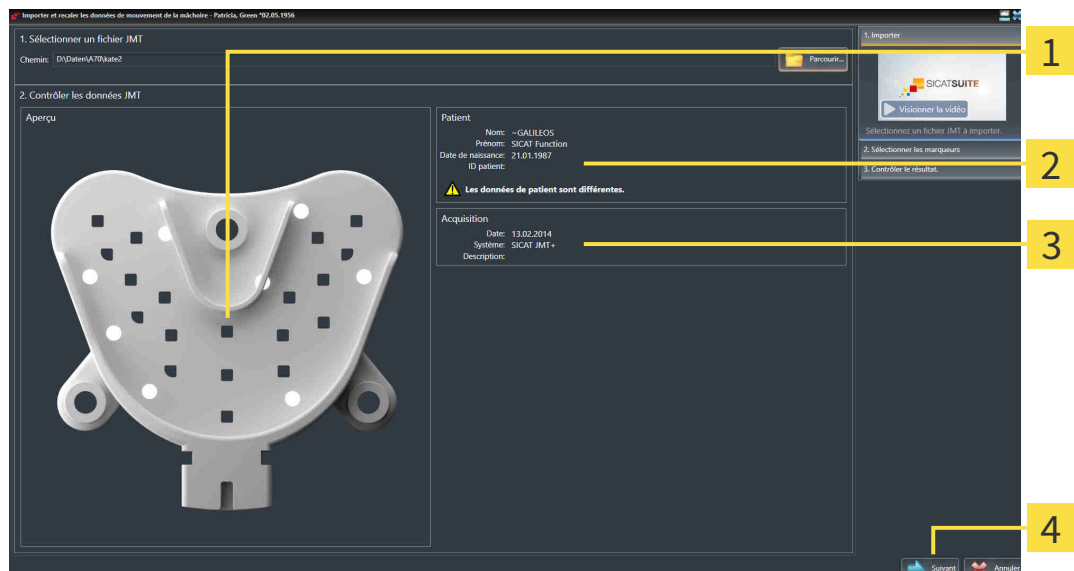

1 Vue SICAT Fusion Bite


3 Zone **Acquisition**

2 Zone **Patient**

4 Bouton **Suivant**

4. Assurez-vous que le fichier des données de mouvement de la mâchoire correspond bien à l'étude active.
5. Cliquez sur **Suivant**.

► L'étape **Sélectionner les marqueurs** s'ouvre :

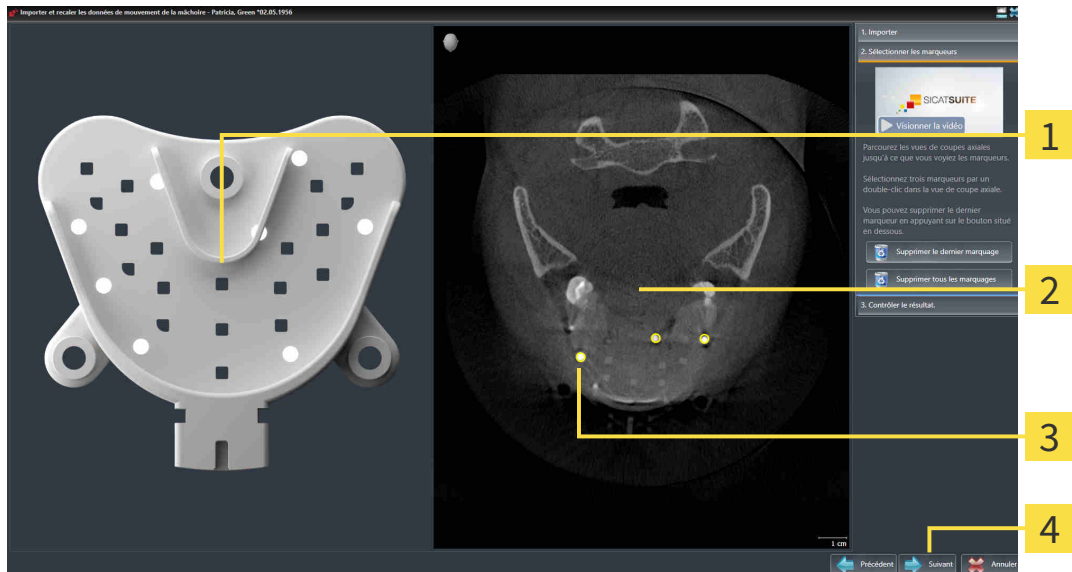


1 Fourchette occlusale-Vue

3 Marquage sélectionné

2 Axial-Vue

4 Bouton **Suivant**

6. Naviguez dans les coupes axiales jusqu'à ce que la vue de coupe **Axial** affiche au moins un marqueur sphérique.
7. Dans la vue de coupe **Axial**, double-cliquez sur un marqueur sphérique.
 - SICAT Function marque le marqueur sphérique.
8. Répétez la dernière étape jusqu'à ce que trois marqueurs sphériques soient marqués.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 - SICAT Function enregistre les données de mouvement de la mâchoire.

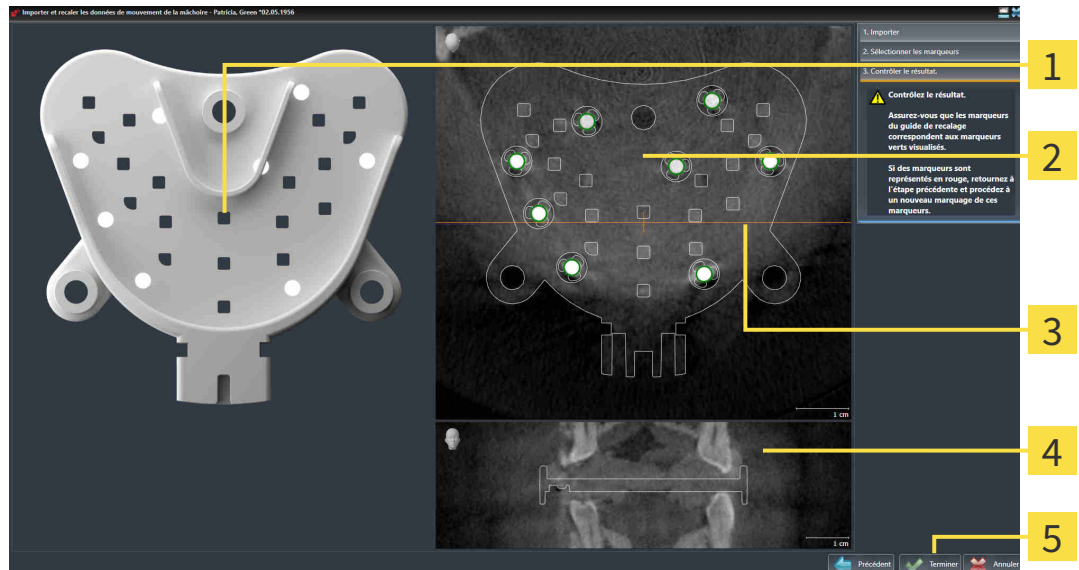► L'étape **Contrôler le résultat** s'ouvre :**1** Fourchette occlusale-Vue**4** Coronal-Vue**2** Axial-Vue de coupe**5** Bouton **Terminer****3** Ligne de référence coronale

10. Assurez-vous que les marqueurs sphériques sur la **Fourchette occlusale** et dans la vue de coupe **Axial** coïncident.
 11. Assurez-vous dans la vue **Coronal** que SICAT Function a correctement détecté la position de la fourchette occlusale. Déplacez la ligne de référence coronale dans la vue **Axial** ou naviguez à travers les coupes dans la vue **Coronal**.
 12. Cliquez sur **Terminer**.
- SICAT Function importe les données de mouvement de la mâchoire enregistrée.
 - L'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** se ferme.
 - SICAT Function affiche un objet **Données de mouvement** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [► Page 65 - SIDEXIS 4].



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** :

- Si vous n'êtes pas satisfait du dernier marqueur, vous pouvez cliquer sur le bouton **Supprimer le dernier marquage**.
- Si la **Fourchette occlusale** n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Sélectionner les marqueurs** avec des marqueurs placés en d'autres positions.
- Si vous voulez annuler l'importation et le recalage des données de mouvement de la mâchoire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

26 SEGMENTATION



Des artefacts excessifs ou une résolution insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec de la procédure de segmentation ou des résultats insuffisants. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant une qualité suffisante de la segmentation des structures anatomiques concernées.



Une qualité insuffisante de la segmentation peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez que la qualité de la segmentation est suffisante pour l'utilisation prévue.

Pour représenter le mouvement de la mandibule, vous devez définir la limite entre la mandibule et l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle la segmentation. L'assistant **Segmentation de la mandibule** vous permet de segmenter non seulement la mandibule, mais aussi les fosses du patient. Dans SICAT Function, la segmentation est une procédure semi-automatique.

Procédure semi-automatique signifie que vous devez marquer manuellement des parties de la mandibule et des fosses à l'aide des outils de dessin dans l'assistant **Segmentation de la mandibule**. Après un marquage, l'assistant de segmentation calcule automatiquement des parties similaires.

Les actions suivantes sont disponibles pour la segmentation de la mandibule et des fosses :

- *Segmenter la mandibule* [► Page 119 - SIDEXIS 4]
- *Segmenter les fosses* [► Page 121 - SIDEXIS 4]

Après la segmentation de la mandibule, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Visualiser et visionner des mouvements anatomiques individuels du patient dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].
- Visualiser des tracés de mouvements anatomiques individuels du patient dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 138 - SIDEXIS 4].
- Visualisation des articulations temporo-mandibulaires en mouvement dans l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 141 - SIDEXIS 4].

26.1 SEGMENTER LA MANDIBULE



À chaque démarrage, l'assistant **Segmenter la mandibule et les condyles** effectue un calcul préliminaire de la segmentation. La durée de ce calcul dépend des performances de votre ordinateur.



La segmentation de SICAT Fonction utilise des régions au lieu de contours anatomiques. Par conséquent, il ne vous est que rarement nécessaire de redessiner des contours anatomique avec exactitude. À la place, marquez des régions contigües en plaçant des traits dans les régions.

Vous trouverez des informations générales sur la segmentation dans *Segmentation* [► Page 118 - SIDEXIS 4].


Procédez de la manière suivante pour segmenter la mandibule :

- ☑ L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 59 - SIDEXIS 4].



1. Cliquez sur l'icône **Segmenter la mandibule et les condyles**.

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** s'ouvre :

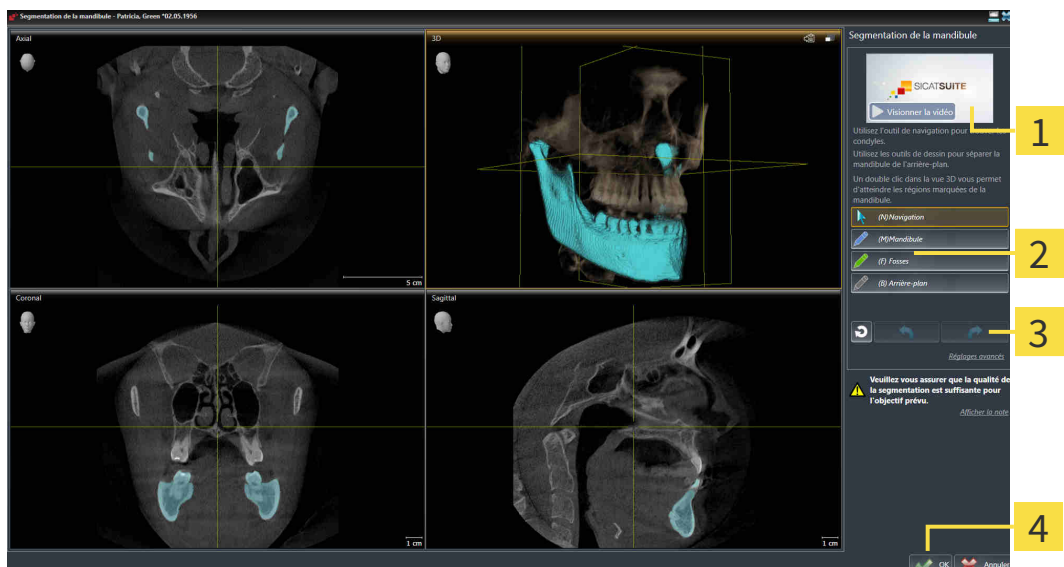

1 Exemple de vidéo

3 Bouton **Réinitialiser**, bouton **Annuler** et bouton **Répéter**

2 Zone **Outils de dessin**

4 Bouton **OK**

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** effectue un calcul préliminaire de la segmentation.

2. Adaptez la vue **Axial**, la vue **Coronal**, ou la vue **Sagittal** de manière à ce que la mandibule et les fosses soient visibles.



3. Cliquez sur le bouton **Mandibule**.

4. Amenez le pointeur de la souris sur la mandibule dans la vue de coupe 2D de votre choix.

► Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un crayon.

5. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.

6. Suivez la région interne de la mandibule avec le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente votre marquage à l'aide d'une ligne bleue.
7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function segmente la mandibule en fonction de votre marquage.
8. Si vous voulez ajouter des régions supplémentaires à la mandibule, cliquez sur l'icône **Navigation**, naviguez dans une vue 2D jusqu'aux structures voulues et marquez-les comme décrit précédemment.
9. Si la segmentation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton **OK**.
 - ▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** se ferme.
 - ▶ SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [▶ Page 65 - SIDEXIS 4].
 - ▶ La vue **3D** représente le résultat de la segmentation.



Vous pouvez utiliser l'outil de dessin **Arrière-plan**, soit pour marquer des régions comme arrière-plan, soit pour corriger des régions trop grandes de la segmentation semi-automatique.

Vous pouvez également poursuivre la segmentation ou l'améliorer ultérieurement.



Vous pouvez naviguer dans les vues de coupes 2D en commutant sur le mode **Navigation**.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles** :

- Des raccourcis clavier spéciaux sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Raccourcis clavier* [▶ Page 196 - SIDEXIS 4].
- Si vous double-cliquez dans la vue **3D** sur une position appartenant à la région segmentée, toutes les vues de coupe 2D visualisent la coupe correspondante. De plus, SICAT Function centre les réticules sur cette position. Utilisez cette aide à la navigation par exemple pour corriger des régions discontinues ou fermer des trous.
- Si la segmentation ne correspond pas aux particularités anatomiques, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.
- Si vous voulez restaurer une opération annulée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Répéter**.
- Pour annuler toutes les étapes de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Dans de rares cas, il peut arriver que le calcul préliminaire du jeu de données ne fournisse pas un résultat optimal. Dans un tel cas, vous pouvez cliquer sur **Réglages avancés** et décocher la case **Détecter automatiquement l'arrière-plan**. À l'aide de l'outil de dessin **Arrière-plan**, vous pouvez ensuite marquer les régions qui ne font pas partie de l'os mandibulaire ou des fosses avec au moins un trait.
- Si vous voulez annuler la segmentation des condyles et de la région mandibulaire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.



26.2 SEGMENTER LES FOSSES

Depuis l'introduction de l'espace de travail **TMJ**, la segmentation des fosses n'est plus absolument nécessaire, dans la plupart des cas. Utilisez l'espace de travail **TMJ** pour évaluer la relation dynamique condyle-fosse sans segmentation.



À chaque démarrage, l'assistant **Segmenter la mandibule et les condyles** effectue un calcul préliminaire de la segmentation. La durée de ce calcul dépend des performances de votre ordinateur.



La segmentation de SICAT Fonction utilise des régions au lieu de contours anatomiques. Par conséquent, il ne vous est que rarement nécessaire de redessiner des contours anatomique avec exactitude. À la place, marquez des régions contiguës en plaçant des traits dans les régions.

Vous trouverez des informations générales sur la segmentation dans *Segmentation* [▶ Page 118 - SIDEXIS 4].


Procédez de la manière suivante pour segmenter les fosses :

- ☑ L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [▶ Page 59 - SIDEXIS 4].



1. Cliquez sur l'icône **Segmenter la mandibule et les condyles**.

▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** s'ouvre :

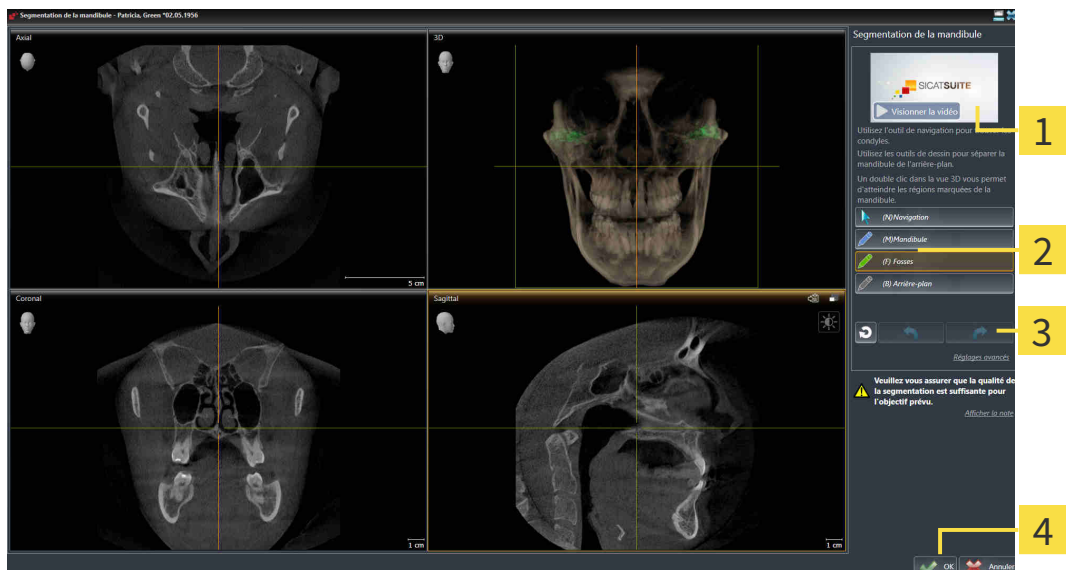

1 Exemple de vidéo

2 Zone **Outils de dessin**

3 Bouton **Réinitialiser**, bouton **Annuler** et bouton **Répéter**

4 Bouton **OK**

▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** effectue un calcul préliminaire de la segmentation.

2. Adaptez la vue **Axial**, la vue **Coronal**, ou la vue **Sagittal** de manière à ce que la mandibule et les fosses soient visibles.



3. Cliquez sur le bouton **Fosses**.

4. Amenez le pointeur de la souris sur les fosses dans la vue de coupe 2D de votre choix.

- ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un crayon.
- 5. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
- 6. Suivez la région interne des fosses avec le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente votre marquage à l'aide d'une ligne verte.
- 7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function segmente les fosses en fonction de votre marquage.
- 8. Si vous voulez ajouter des régions supplémentaires aux fosses, cliquez sur l'icône **Navigation**, naviguez dans une vue 2D jusqu'aux structures voulues et marquez-les comme décrit précédemment.
- 9. Si la segmentation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton **OK**.
 - ▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** se ferme.
 - ▶ SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [▶ Page 65 - SIDEXIS 4].
 - ▶ La vue **3D** représente le résultat de la segmentation.



Vous pouvez utiliser l'outil de dessin **Arrière-plan**, soit pour marquer des régions comme arrière-plan, soit pour corriger des régions trop grandes de la segmentation semi-automatique.

Vous pouvez également poursuivre la segmentation ou l'améliorer ultérieurement.



Vous pouvez naviguer dans les vues de coupes 2D en commutant sur le mode **Navigation**.



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles** :

- Des raccourcis clavier spéciaux sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Raccourcis clavier* [► Page 196 - SIDEXIS 4].
- Si vous double-cliquez dans la vue **3D** sur une position appartenant à la région segmentée, toutes les vues de coupe 2D visualisent la coupe correspondante. De plus, SICAT Function centre les réticules sur cette position. Utilisez cette aide à la navigation par exemple pour corriger des régions discontinues ou fermer des trous.
- Si la segmentation ne correspond pas aux particularités anatomiques, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.
- Si vous voulez restaurer une opération annulée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Répéter**.
- Pour annuler toutes les étapes de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Dans de rares cas, il peut arriver que le calcul préliminaire du jeu de données ne fournisse pas un résultat optimal. Dans un tel cas, vous pouvez cliquer sur **Réglages avancés** et décocher la case **Détecter automatiquement l'arrière-plan**. À l'aide de l'outil de dessin **Arrière-plan**, vous pouvez ensuite marquer les régions qui ne font pas partie de l'os mandibulaire ou des fosses avec au moins un trait.
- Si vous voulez annuler la segmentation des condyles et de la région mandibulaire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

27 EMPREINTES OPTIQUES



Vous pouvez uniquement importer et recalcr des empreintes optiques pour des données de radiographies créées par des appareils de radiographie 3D de Sirona.

SICAT Function peut représenter simultanément des données de radiographie et des empreintes optiques coordonnées du même patient. La représentation combinée apporte des informations supplémentaires pour l'analyse et le diagnostic. En outre, la mise en œuvre thérapeutique est basée sur les empreintes optiques.

Les actions suivantes sont nécessaires pour utiliser des données d'empreintes optiques dans SICAT Function :

- Importation d'un fichier d'empreintes optiques (composé d'une empreinte de la mandibule et d'une empreinte du maxillaire) contenant des empreintes optiques d'un système de prise d'empreinte tel que CEREC avec une licence Open GALILEOS.
- Recalage d'empreintes optiques sur les données de radiographie

SICAT Function prend en charge les formats de fichiers d'empreintes optiques suivants :

- Fichiers SIXD contenant une empreinte optique du maxillaire et une empreinte optique de la mandibule
- Fichiers SSI contenant une empreinte optique du maxillaire et une empreinte optique de la mandibule
- Les fichiers STL qui contiennent une empreinte optique des maxillaires ou une empreinte optique des mandibules (licence **SICAT Suite STL Import** nécessaire)

Les outils suivants sont disponibles pour les empreintes optiques :

- *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4]
- *Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT* [► Page 132 - SIDEXIS 4]
- Activer, masquer et afficher des empreintes optiques - vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4].
- Focaliser les empreintes optiques et supprimer les empreintes optiques - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 64 - SIDEXIS 4].

Les empreintes optiques en format STL nécessitent une étape supplémentaire à l'importation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Étapes supplémentaires pour les empreintes optiques en format STL*. [► Page 131 - SIDEXIS 4].

27.1 IMPORTER ET RECALER LES EMPREINTES OPTIQUES


ATTENTION

L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.


ATTENTION

Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.


ATTENTION

Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.


ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.


ATTENTION

Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.


ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou des points manquants pour le recalage peuvent entraîner l'échec de la procédure de recalage d'empreintes optiques. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des empreintes optiques et des radiographies 3D permettant un recalage précis.


ATTENTION

La sélection, dans le procédé de recalage d'empreintes optiques, de marquages qui ne coïncident pas peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Lorsque vous recalez des données d'empreintes optiques, sélectionnez soigneusement, dans les radiographies 3D et dans les empreintes optiques, des marquages qui coïncident.

**ATTENTION****Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.**

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** indique toujours les données patient et ignore le réglage **Anonymiser** afin que vous puissiez contrôler si les données de radiographie 3D et les empreintes optiques correspondent.



Vous pouvez utiliser la **Fenêtre d'examen** pour vérifier qu'une empreinte optique est orientée avec précision par rapport aux données de radiographie. Vous pouvez décaler la **Fenêtre d'examen** et naviguer à travers les coupes dans la **Fenêtre d'examen**.

Vous trouverez des informations générales sur les empreintes optiques dans *Empreintes optiques* [► Page 124 - SIDEXIS 4].


Procédez de la manière suivante pour importer et recaler des empreintes optiques :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.



1. Cliquez sur l'icône **Importer et recaler les empreintes optiques**.
 - L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** s'ouvre.
3. Sélectionnez dans la fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** le fichier des données d'empreinte optique désiré, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - La fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** se ferme.


► SICAT Function ouvre le fichier d'empreintes optiques sélectionné :

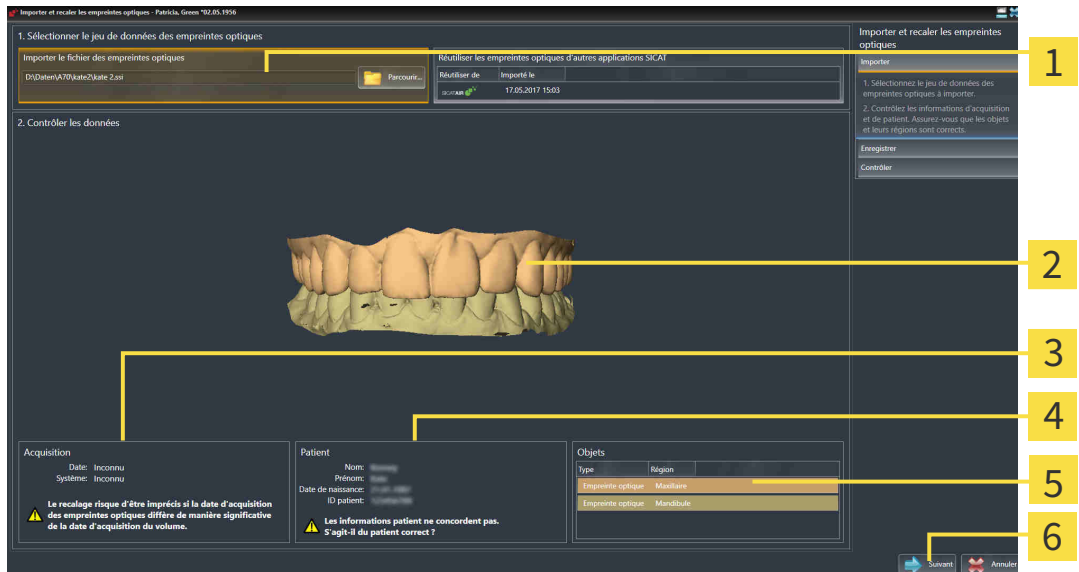

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zone Importer le fichier des empreintes optiques</p> <p>2 3DVue des empreintes optiques</p> <p>3 Informations sur l'acquisition</p> | <p>4 Informations sur les patients</p> <p>5 Liste d'objets</p> <p>6 Bouton Suivant</p> |
|---|--|


4. Vérifiez les informations relatives à l'acquisition et au patient.
5. Assurez-vous que les objets et leurs régions sont corrects. La couleur de fond dans la liste d'objets correspond à la couleur des objets dans la vue **3D**.
6. Cliquez sur **Suivant**.

- ▶ Si les données patient sont différentes dans la radiographie 3D et dans l’empreinte optique, SICAT Function ouvre la fenêtre **Informations patient différentes**:

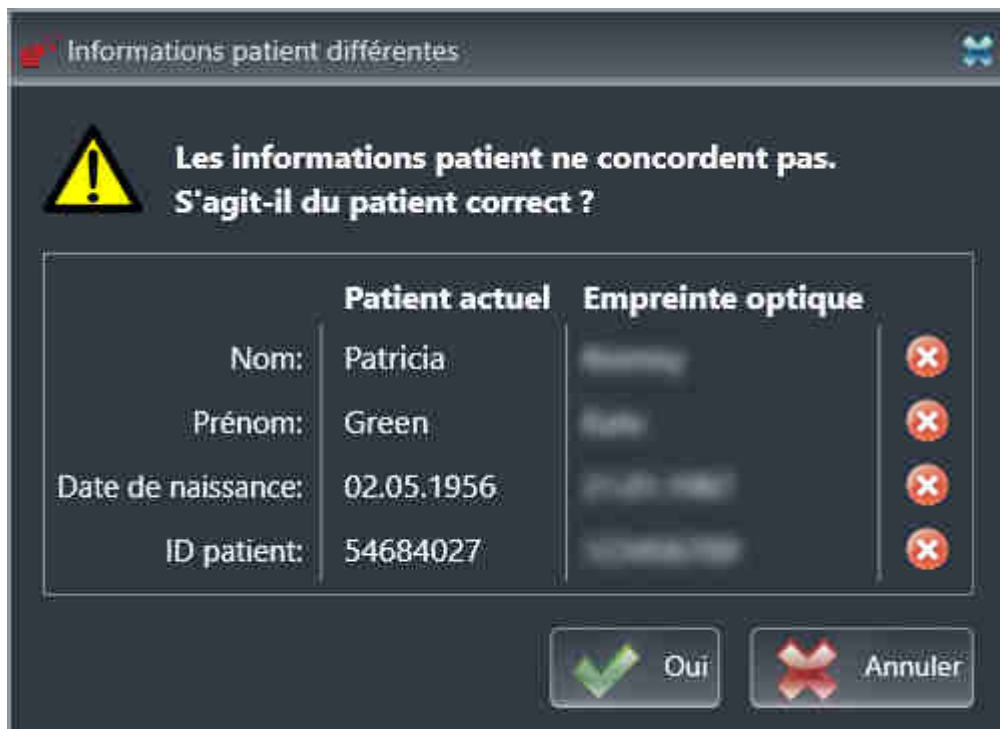


7. Comparez les informations patient. Si vous êtes certain(e) que l’empreinte optique correspond au patient actuel, appuyez sur le bouton **Oui**.

- ▶ L'étape **Enregistrer** s'ouvre pour la première empreinte optique :

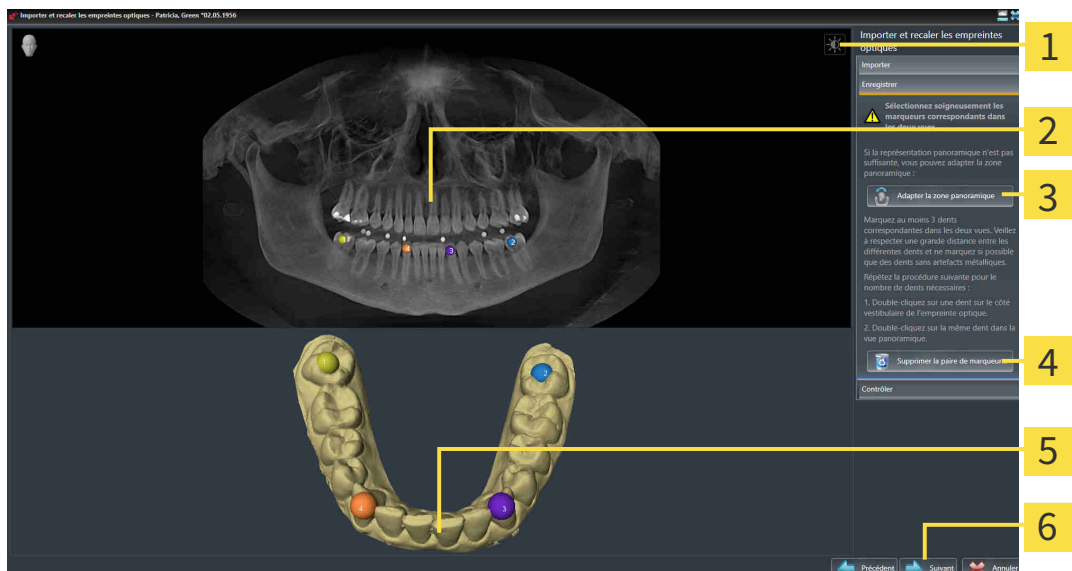

- | | |
|---|--|
| 1 Symbole Adapter le contraste et la luminosité | 4 Bouton Supprimer la paire de marqueurs active |
| 2 Panorama-Vue | 5 3DVue représentant la première empreinte optique |
| 3 Bouton Adapter la zone panoramique | 6 Bouton Suivant |

8. Pour la première empreinte optique, double-cliquez sur une même dent dans la vue **Panorama** et dans la vue **3D**, sur le côté vestibulaire de l'empreinte optique. Veillez à respecter une grande distance entre les différentes dents et ne marquez que des dents sans artefacts métalliques. Répétez cette étape jusqu'à avoir marqué au moins trois dents correspondantes dans les deux vues.
 - ▶ Les marquages avec différentes couleurs et numéros dans les deux vues représentent les dents correspondantes de la première empreinte optique.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 - ▶ SICAT Function calcule le recalage de la première empreinte optique sur les données de radiographie.
 - ▶ L'étape **Contrôler** s'ouvre pour la première empreinte optique :

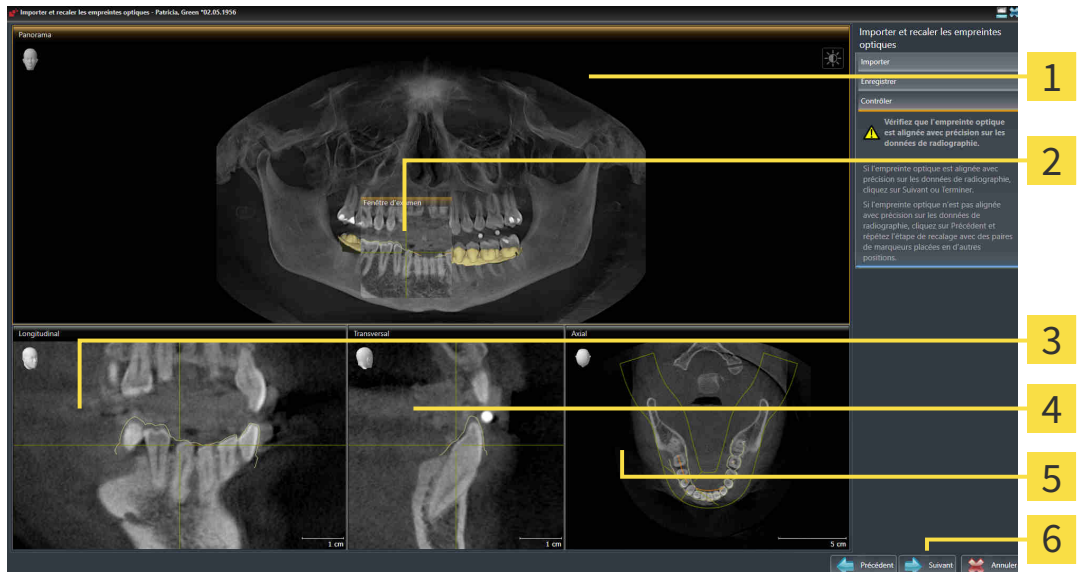

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 4 Transversal-Vue |
| 2 Fenêtre d'examen | 5 Axial-Vue |
| 3 Longitudinal-Vue | 6 Bouton Suivant |

10. Vérifiez dans les vues de coupe 2D que l'empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie. Naviguez à travers les coupes et contrôlez les contours représentés.
11. Si l'empreinte optique n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Enregistrer** avec des paires de marqueurs placées en d'autres positions.
12. Si la première empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - ▶ L'étape **Enregistrer** s'ouvre pour la deuxième empreinte optique.
13. Pour la deuxième empreinte optique, double-cliquez sur une même dent dans la vue **Panorama** et dans la vue **3D**, sur le côté vestibulaire de l'empreinte optique. Veillez à respecter une grande distance entre les différentes dents et ne marquez si possible que des dents sans artefacts métalliques. Répétez cette étape jusqu'à avoir marqué au moins trois dents correspondantes dans les deux vues. Vous pouvez augmenter la précision du recalage en marquant jusqu'à cinq dents.
 - ▶ Les marquages avec différentes couleurs et numéros dans les deux vues représentent les dents correspondantes de la deuxième empreinte optique.

14. Cliquez sur **Suivant**.

- ▶ SICAT Function calcule le recalage de la deuxième empreinte optique sur les données de radiographie.
- ▶ L'étape **Contrôler** s'ouvre pour la deuxième empreinte optique.

15. Vérifiez dans les vues de coupe 2D que l'empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie. Naviguez à travers les coupes et contrôlez les contours représentés.

16. Si l'empreinte optique n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Enregistrer** avec des paires de marqueurs placées en d'autres positions. Vous pouvez augmenter la précision du recalage en marquant jusqu'à cinq dents.

17. Si la deuxième empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Terminer**.

- ▶ L'assistant **Importer et recalage des empreintes optiques** se ferme.
- ▶ SICAT Function ajoute les empreintes optiques sélectionnées au **Navigateur d'objets**.
- ▶ SICAT Function affiche les empreintes optiques recalées.



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans l'assistant **Importer et recalage des empreintes optiques** :

- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D, en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 81 - SIDEXIS 4].
- Vous pouvez adapter la zone panoramique en cliquant sur l'icône **Adapter la zone panoramique**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter la zone panoramique* [▶ Page 108 - SIDEXIS 4].
- Si vous voulez supprimer une paire de marqueurs à l'étape **Enregistrer**, vous pouvez sélectionner un marqueur de la paire et cliquer sur le bouton **Supprimer la paire de marqueurs active**.
- Si vous voulez annuler l'importation et le recalage d'empreintes optiques, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.


27.2 ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES EMPREINTES OPTIQUES EN FORMAT STL.

Les fichiers STL ne contiennent aucune information sur la position et l'orientation d'empreintes optiques. C'est pourquoi, vous devez adapter la position et l'orientation si nécessaire :

Vous avez déjà activé une licence **SICAT Suite Importation STL**.

1. Ouvrez en format STL les empreintes optiques d'un fichier. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4].

► La fenêtre **Assistant d'importation STL** s'ouvre :

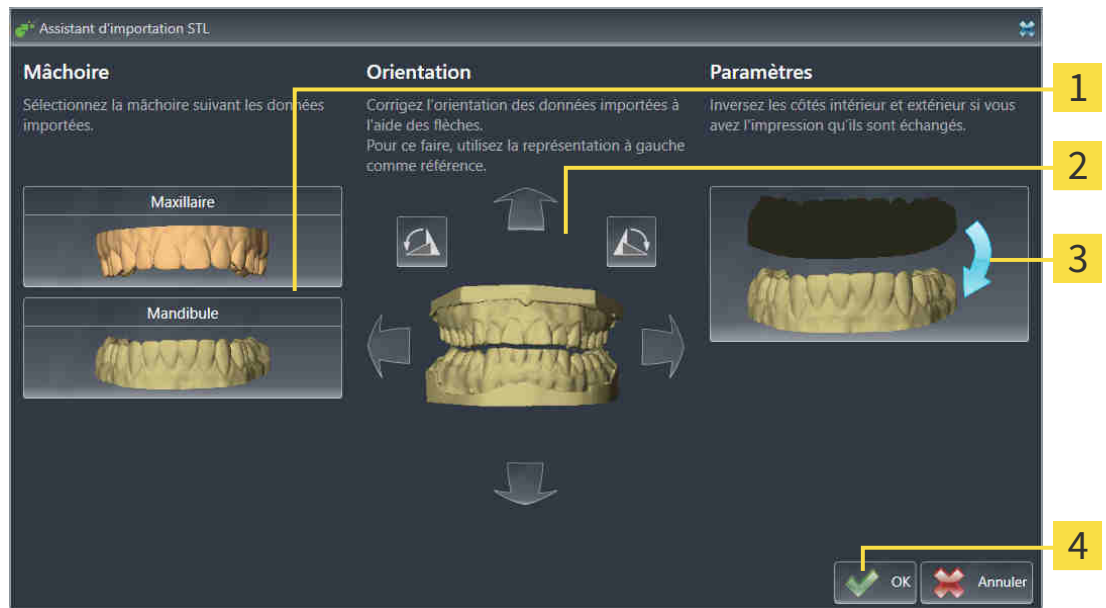

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Sélection de la mâchoire | 3 Inversement des côtés intérieur et extérieur |
| 2 Changement d'orientation | 4 Bouton OK |

2. Sélectionnez dans la zone **Mâchoire**, si l'empreinte optique contient le **maxillaire** ou de la **mandibule**, en cliquant sur le symbole correspondant.



3. Si nécessaire, changez l'orientation des empreintes optiques par rapport au pré-positionnement approximatif en cliquant sur les symboles de flèches ou sur les symboles de rotation dans l'espace **Orientation**.

4. Si nécessaire, inversez les côtés intérieur et extérieur des empreintes optiques en cliquant sur la représentation des empreintes optiques dans l'espace **Paramètres**.

5. Cliquez sur le bouton **OK**.

6. Si nécessaire, répétez les étapes pour un deuxième fichier STL. SICAT Function affecte automatiquement le deuxième fichier STL à l'autre mâchoire respective.

► SICAT Function affiche les empreintes optiques importées dans l'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques**.

7. Poursuivez avec l'enregistrement des empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4].

27.3 RÉUTILISER LES EMPREINTES OPTIQUES D'AUTRES APPLICATIONS SICAT



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.



Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** indique toujours les données patient et ignore le réglage **Anonymiser** afin que vous puissiez contrôler si les données de radiographie 3D et les empreintes optiques correspondent.

Vous trouverez des informations générales sur les empreintes optiques dans *Empreintes optiques* [► Page 124 - SIDEXIS 4].


Procédez de la manière suivante pour réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.

- ☑ Vous avez déjà importé des empreinte optiques concernant l'étude ouverte dans une autre application SICAT et vous n'utilisez pas encore ces empreintes optiques dans SICAT Function.



1. Cliquez sur l'icône **Importer et recalcr les empreintes optiques**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Cliquez dans la zone **Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT** sur la ligne représentant les empreintes optiques souhaitées.
3. SICAT Function affiche les empreintes optiques sélectionnées :

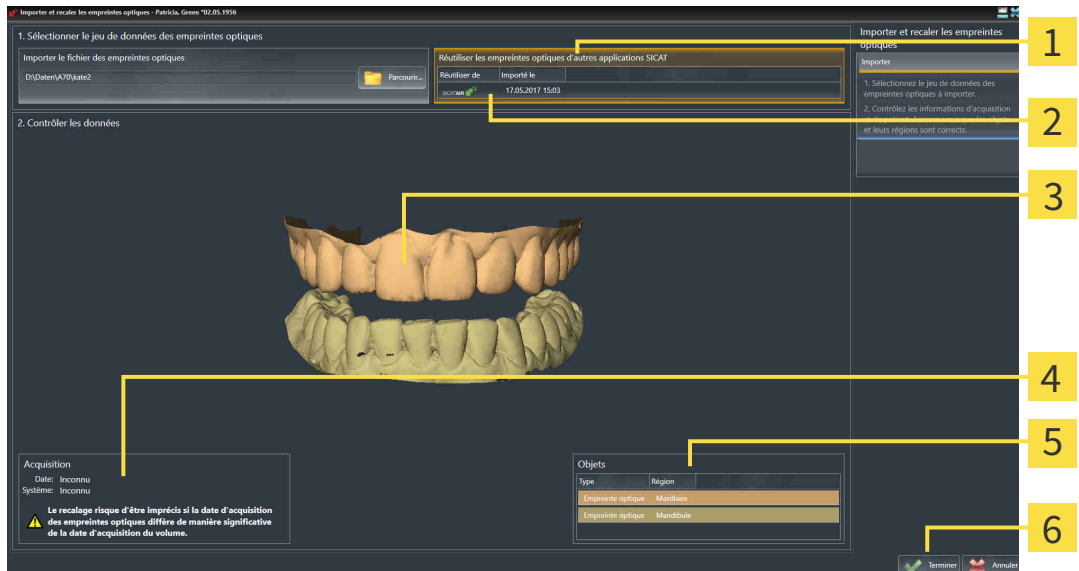

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zone Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT</p> <p>2 Liste des empreintes optiques d'autres applications SICAT</p> <p>3 3DVue des empreintes optiques</p> | <p>4 Informations sur l'acquisition</p> <p>5 Liste d'objets</p> <p>6 Bouton Terminer</p> |
|---|--|

4. Vérifiez les informations relatives à l'acquisition et au patient. Assurez-vous que les objets et leurs régions sont corrects. La couleur de fond dans la liste d'objets correspond à la couleur des objets dans la vue **3D**.
5. Cliquez sur le bouton **Terminer**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ajoute les empreintes optiques sélectionnées au **Navigateur d'objets**.
 - ▶ SICAT Function affiche les empreintes optiques sélectionnées.

Pour annuler la reprise d'empreintes optiques d'autres applications SICAT, vous pouvez cliquer sur **Anuler**.

28 ARTICULATION ANATOMIQUE

SICAT Function visualise l'articulation anatomique d'un patient grâce au fusionnement, par le logiciel, des données de radiographie 3D et des données d'un appareil de mesure du mouvement de la mâchoire. C'est ce que l'on appelle articulation anatomique. Après avoir segmenté la mandibule, vous pouvez suivre tous les mouvements du patient jusque dans les articulations temporo-mandibulaires.

SICAT Function a besoin des données suivantes pour l'articulation anatomique :

- Données de radiographie 3D segmentées - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Segmentation* [► Page 118 - SIDEXIS 4].
- Données recalées du mouvement de la mâchoire - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 111 - SIDEXIS 4].

SICAT Function peut utiliser des empreintes optiques comme source d'informations supplémentaire. Les empreintes optiques vous permettent par exemple d'analyser les mouvements de la mâchoire d'un patient avant l'occlusion finale. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Empreintes optiques* [► Page 124 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez examiner les mouvements individuels d'un patient à l'aide des outils suivants :

- Espace JMT - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4]. Vous pouvez utiliser les boutons de lecture dans la zone JMT pour visionner le mouvement individuel de la mandibule d'un patient dans la vue **3D**. Un bouton de la zone JMT vous permet en outre d'exporter les données de mouvement de la mâchoire.
- **3D**Vue - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - SIDEXIS 4].
- **Fenêtre d'examen** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 86 - SIDEXIS 4].


Pour analyser les mouvements individuels de la mandibule d'un patient, vous pouvez placer le réticule avec un double clic dans une vue de coupe 2D, à la position choisie sur la mandibule. SICAT Function affiche ensuite le tracé de mouvement correspondant à la position choisie dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [► Page 85 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez aussi placer la **Fenêtre d'examen** à la position choisie sur la mandibule. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 138 - SIDEXIS 4].

Dans la vue **3D**, SICAT Function indique à l'aide de différentes couleurs si la position choisie se trouve sur la mandibule segmentée ou en dehors. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 139 - SIDEXIS 4] et *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 140 - SIDEXIS 4].

28.1 INTERAGIR AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE

La zone JMT est disponible dans SICAT Function pour la gestion des mouvements de la mâchoire :

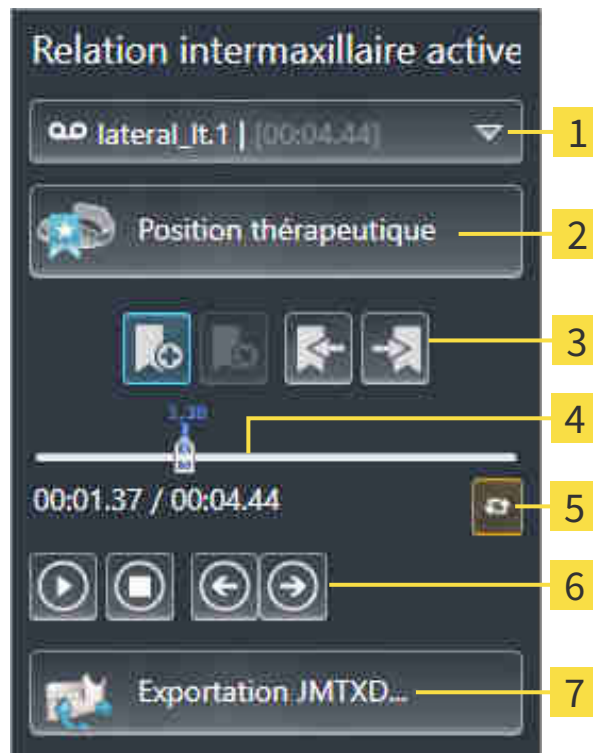

1 Liste **Relation intermaxillaire active**

2 Bouton **Position thérapeutique**

3 Boutons de signet

4 Axe du temps avec curseur

5 Symbole **Commuter le mode de lecture**

6 Boutons de lecture

7 Bouton **Exportation JMTXD**

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans la zone JMT :

- Sélectionner les relations intermaxillaires statiques ou les mouvements de la mâchoire.
- Interagir avec les mouvements de la mâchoire.
- Gérer les signets.
- Définir une position thérapeutique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [► Page 164 - SIDEXIS 4].
- Exporter les données de mouvement de la mâchoire.

SÉLECTIONNER LES RELATIONS INTERMAXILLAIRES STATIQUES OU LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE.

Procédez de la manière suivante pour sélectionner une **Relation intermaxillaire statique** ou une **Relation intermaxillaire dynamique** :

1. Cliquez sur la liste **Relation intermaxillaire active** .

▶ La liste **Relation intermaxillaire active** s'ouvre.



2. Choisissez la **Relation intermaxillaire statique** ou la **Relation intermaxillaire dynamique** souhaitée.



▶ La liste **Relation intermaxillaire active** se ferme.

▶ La zone JMT affiche la désignation de la relation intermaxillaire sélectionnée.

▶ La vue **3D** représente la relation intermaxillaire sélectionnée.

INTERAGIR AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE

Procédez de la manière suivante pour interagir avec les mouvements de la mâchoire :

- Les données de mouvement de la mâchoire ont déjà été importées. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [▶ *Page 113 - SIDEXIS 4*].



1. Pour démarrer la lecture, cliquez sur l'icône **Démarrer**.



2. Pour arrêter la lecture, cliquez sur l'icône **Arrêter**.



3. Pour sauter à la trame suivante, cliquez sur l'icône **En avant**.



4. Pour sauter à la trame précédente, cliquez sur l'icône **En arrière**.



5. Pour commuter le mode de lecture entre "une fois" et "en boucle", cliquez sur l'icône **Commuter le mode de lecture**.

6. Pour modifier manuellement la position sur l'axe du temps, cliquez sur le curseur dans la zone JMT, déplacez la souris et relâchez le bouton gauche de la souris à la position voulue.

GÉRER LES SIGNETS DANS LA ZONE JMT

Procédez de la manière suivante pour gérer les signets dans la zone JMT :



1. Pour ajouter un signet à la position actuelle sur l'axe du temps, cliquez sur l'icône **Ajouter un signet**.



2. Pour supprimer un signet à la position actuelle sur l'axe du temps, cliquez sur l'icône **Supprimer le signet**.



3. Pour déplacer le curseur à la position du signet suivant, cliquez sur l'icône **Signet suivant**.



4. Pour déplacer le curseur à la position du signet précédent, cliquez sur l'icône **Signet précédent**.

Dans les cas suivants, il n'est pas possible de supprimer un signet :

- Vous avez défini un signet sur une position thérapeutique pour laquelle une commande se trouve dans le panier. Pour supprimer le signet, terminez la commande ou supprimez-la.
- Vous avez sélectionné un signet en tant que relation intermaxillaire active. Pour supprimer le signet, sélectionnez le tracé de mouvement correspondant ou la relation intermaxillaire statique correspondante et cliquez sur l'icône **Signet suivant**.

EXPORTER LES DONNÉES DE MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE

Procédez de la manière suivante pour exporter les données de mouvement de la mâchoire :

- Vous avez déjà importé et recalé des données de mouvement de la mâchoire.
- Vous avez déjà importé et recalé des empreintes optiques du maxillaire et de la mandibule.



1. Cliquez sur le bouton **Exportation JMTXD**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
2. Sélectionnez un répertoire de destination et modifiez le nom du fichier si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - ▶ SICAT Function ferme la fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows.
 - ▶ SICAT Function exporte les données de mouvement de la mâchoire et les empreintes optiques dans le fichier spécifié (format de fichier JMTXD, compatibilité avec CEREC 4.4 et InLab15).



Vous pouvez exporter les données de mouvement de la mâchoire sous forme anonyme en activant auparavant l'anonymisation dans les réglages.

28.2 REPRÉSENTATION DE TRACÉS DE MOUVEMENTS DANS LA VUE 3D

Les tracés de mouvements représentent la trajectoire dans l'espace d'un point de la mandibule. Ils sont semblables à la représentation des systèmes de condylographie rapportée aux axes usuels. Le point dont la trajectoire est représentée est appelé point de tracé. Vous pouvez choisir librement des points de tracé dans SICAT Function. Vous pouvez sélectionner des mouvements individuels d'un patient dans la zone JMT et les examiner dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace JMT dans *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].

Pour représenter les tracés de mouvements dans la vue **3D**, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Recalez les données de mouvement de la mâchoire sur les données de radiographies 3D - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 111 - SIDEXIS 4].
- Segmentez les données de radiographie 3D - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Segmentation* [► Page 118 - SIDEXIS 4].

Une fois que vous avez importé les données de mouvement de la mâchoire et segmenté les données de radiographie 3D, la vue **3D** affiche d'abord les relations originelles de la radiographie 3D. Si vous sélectionnez un mouvement enregistré, la vue **3D** affiche les tracés de mouvements.

SICAT Function marque la position des tracés de mouvements à l'aide de différentes couleurs :

- Si les tracés de mouvement se trouvent sur la mandibule du patient, SICAT Function les repère en vert.
- Si les tracés de mouvement ne se trouvent pas sur la mandibule du patient, SICAT Function les repère en rouge.

Vous pouvez placer les tracés de mouvement sur la mandibule du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 139 - SIDEXIS 4] et *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 140 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez sélectionner un type de représentation pour la vue **3D** et l'adapter à vos besoins. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [► Page 90 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez visualiser la relation entre trois points de tracé différents. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utilisation du triangle de Bonwill* [► Page 144 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez afficher et masquer la limite de la segmentation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher la limite de la segmentation* [► Page 145 - SIDEXIS 4].

Vous pouvez visualiser le mouvement autour du condyle. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [► Page 146 - SIDEXIS 4].

28.3 ADAPTER LES TRACÉS DE MOUVEMENTS AVEC LA FENÊTRE D'EXAMEN

Pour utiliser la **Fenêtre d'examen** en vue d'analyser le mouvement individuel du patient en tout point de la mandibule, procédez de la manière suivante :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 73 - SIDEXIS 4].
- ☑ La vue **Panorama** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 79 - SIDEXIS 4].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 86 - SIDEXIS 4].

- Déplacez la **Fenêtre d'examen** sur la région anatomique voulue :



- ▶ SICAT Function actualise la position des tracés de mouvement dans la vue **3D** en fonction de la position de la **Fenêtre d'examen**. Le point de tracé actuel se trouve sur le réticule de la fenêtre d'examen.
- ▶ Les tracés de mouvement se trouvent à la nouvelle position.

Si le point de tracé se trouve en dehors de la mandibule du patient, vous pouvez positionner les tracés de mouvement sur la mandibule du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 140 - SIDEXIS 4].




Pour déplacer immédiatement la **Fenêtre d'examen** sur la région anatomique voulue, vous pouvez aussi effectuer un double-clic à la position voulue dans la vue **Panorama**.

28.4 ADAPTER LES TRACÉS DE MOUVEMENTS DANS UNE VUE DE COUPE À L'AIDE DU RÉTICULE

Pour utiliser les réticules en vue d'analyser le mouvement individuel du patient en tout point de la mandibule, procédez de la manière suivante :

- ☑ Les réticules sont affichés dans les vues de coupes 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 85 - SIDEXIS 4].
- 1. Activez la vue de coupe 2D voulue. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 79 - SIDEXIS 4].
- 2. Déplacez le réticule sur la région anatomique voulue. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 85 - SIDEXIS 4].

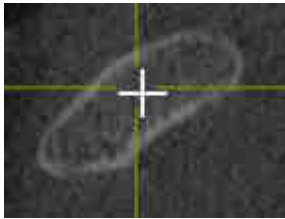

- ▶ SICAT Function actualise la position des tracés de mouvement dans la vue **3D** en fonction de la position du réticule.



Dans la vue **3D**, SICAT Function marque les tracés de mouvement en rouge lorsque vous choisissez une position située en dehors de la mandibule du patient.




Pour déplacer directement le réticule à la position du pointeur de la souris, vous pouvez également double-cliquer dans une vue 2D.

29 FONCTIONS DE L'ESPACE DE TRAVAIL TMJ

L'espace de travail **TMJ** vous assiste dans le diagnostic et la planification du traitement de dysfonctionnements craniomandibulaires. Dans l'espace de travail **TMJ**, vous pouvez comparer la morphologie et le mouvement des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite.

Dans l'espace de travail **TMJ**, vous pouvez afficher simultanément trois tracés différents pour chaque mouvement :

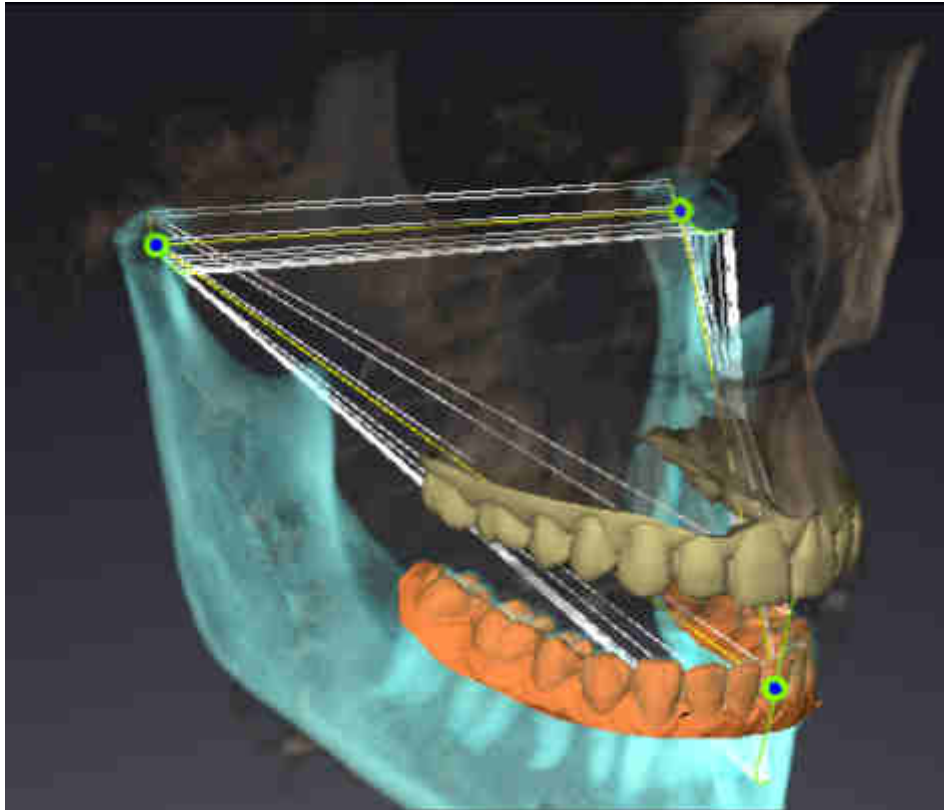

- Tracé pour le condyle gauche
- Tracé pour le condyle droit
- Tracé pour un point de l'occlusion, par exemple le point inter-incisif.

Vous pouvez déplacer les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer les points de tracé* [▶ Page 142 - SIDEXIS 4].

Dans la vue **3D**, vous pouvez placer le point de tracé du point inter-incisif à l'aide d'un double clic. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Placer le point inter-incisif* [▶ Page 143 - SIDEXIS 4].

L'espace de travail **TMJ** offre des options supplémentaires pour l'examen de l'articulation anatomique individuelle d'un patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher la limite de la segmentation* [▶ Page 145 - SIDEXIS 4], *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [▶ Page 146 - SIDEXIS 4] et *Utilisation du triangle de Bonwill* [▶ Page 144 - SIDEXIS 4]. Vous pouvez également utiliser le triangle de Bonwill pour relever des valeurs de l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Valeurs d'articulateur* [▶ Page 147 - SIDEXIS 4].

29.1 DÉPLACER LES POINTS DE TRACÉ

SICAT Function affiche simultanément les tracés des points correspondants du condyle gauche et du condyle droit. À l'aide de ces tracés, vous pouvez comparer le mouvement complet des articulations entre elles.


Procédez de la manière suivante pour déplacer les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe :

☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ** *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 141 - SIDEXIS 4] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 70 - SIDEXIS 4].

☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.

1. Amenez le pointeur de la souris sur le point de tracé de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position du point de tracé voulue.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.


▶ SICAT Function déplace les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe sur la position sélectionnée :

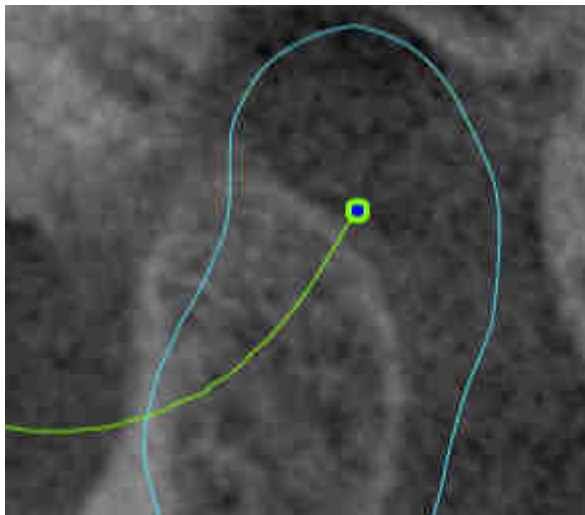

29.2 PLACER LE POINT INTER-INCISIF

Procédez de la manière suivante pour placer le point inter-incisif dans la vue **3D** :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [▶ Page 141 - *SIDEXIS 4*] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 70 - *SIDEXIS 4*].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.
 - Amenez le pointeur de la souris à la position voulue dans la vue **3D** puis double-cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function utilise la position sélectionnée sur les empreintes dentaires numériques comme point de tracé :

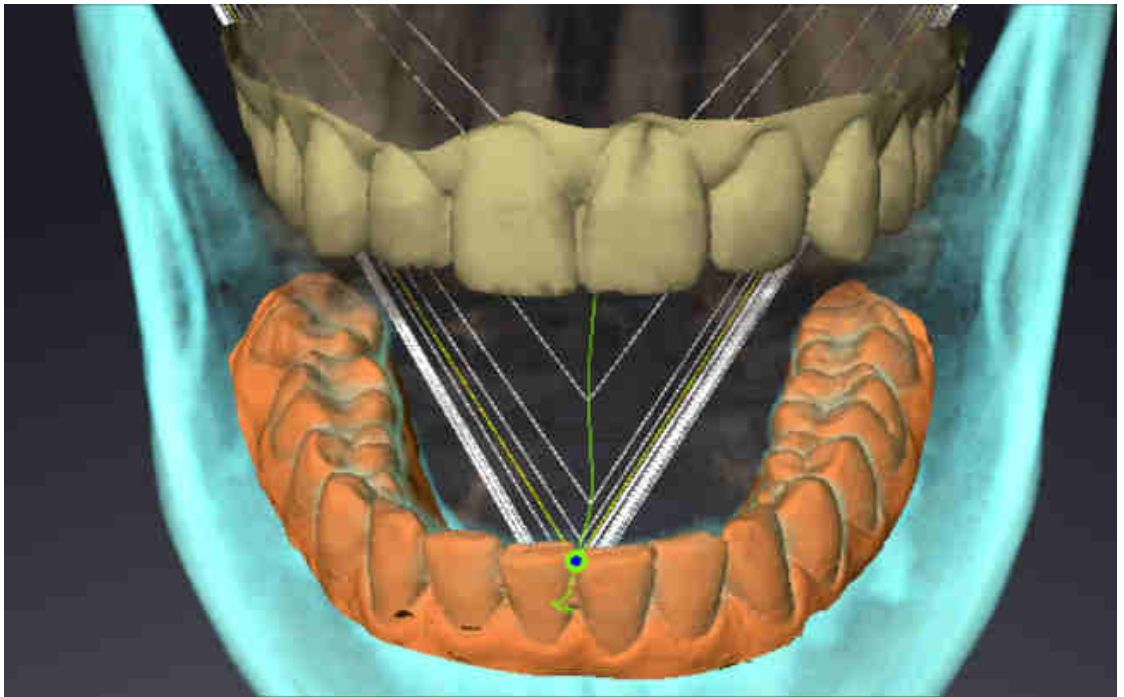

Avec une vue frontale sur le point inter-incisif, vous pouvez identifier et observer en détail les mouvements latéraux de la mandibule.


29.3 UTILISATION DU TRIANGLE DE BONWILL

AFFICHER LE TRIANGLE DE BONWILL

À l'aide du **Triangle de Bonwill**, SICAT Function visualise la relation entre les trois points de tracé. Ceci permet de détecter facilement les dissymétries et les discontinuités dans les mouvements.

Procédez de la manière suivante pour afficher le **Triangle de Bonwill** :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [► Page 141 - SIDEXIS 4] et **Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ** [► Page 70 - SIDEXIS 4].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.
 - Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique dans **Propriétés** la **Triangle de Bonwill** :

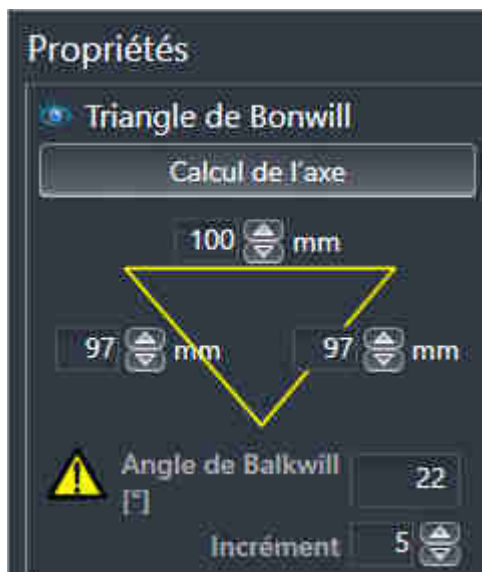

CONFIGURER LE TRIANGLE DE BONWILL

Procédez de la manière suivante pour régler l'incrément du triangle de Bonwill :

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Données de mouvement**.
2. Cliquez dans la zone **Propriétés** à côté de **Incrément** sur une des touches fléchées.
 - SICAT Function modifie la valeur du champ **Incrément**.
 - La vue **3D** représente l'incrément sélectionné du triangle de Bonwill.



Réglez l'incrément de manière à ce que d'éventuelles dissymétries du mouvement soient aisément détectables.

29.4 AFFICHER LA LIMITE DE LA SEGMENTATION

L'activation de la limite de la segmentation vous permet de comparer la qualité de la segmentation avec les radiographies 3D. Au cas où la limite de la segmentation s'écarte de la radiographie 3D, vous pouvez corriger la segmentation dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**.

Le contour bleu indique la position des condyles en fonction du mouvement actuel. Par conséquent, le contour bleu n'est généralement pas superposable aux radiographies 3D et ne convient pas au contrôle de la qualité de la segmentation. Utilisez plutôt le contour jaune pour vérifier la limite de la segmentation.

Procédez de la manière suivante pour afficher la limite de la segmentation :

- Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail **TMJ** dans *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 141 - SIDEXIS 4] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 70 - SIDEXIS 4].
- Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique ou une relation intermaxillaire statique.

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Régions du volume**.

► SICAT Function affiche sous **Propriétés** l'option **Afficher la limite de la segmentation** :



2. Déplacez le curseur de réglage de l'option **Afficher la limite de la segmentation** sur la position **Activé**.

► Les vues 2D affichent la limite de la segmentation avec un contour jaune.

SICAT Function marque la position segmentée de l'articulation à l'aide de différentes couleurs :

- SICAT Function repère les condyles en mouvement à la position segmentée en bleu.
- SICAT Function repère la segmentation originale des radiographies 3D par une ligne de contrôle. SICAT Function marque la ligne de contrôle en jaune.

29.5 AFFICHER LE MOUVEMENT AXÉ SUR LES CONDYLES

Le mouvement axé sur les condyles permet de visualiser les condyles en mouvement en relation avec les fosses. Lorsque le mouvement axé sur les condyles est activé, tous les points des condyles sont visibles pendant la totalité du mouvement dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**. Lorsque le mouvement axé sur les condyles est désactivé, tous les points des fosses sont visibles pendant la totalité du mouvement dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**.

Procédez de la manière suivante pour visualiser le mouvement axé sur les condyles :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [▶ Page 141 - SIDEXIS 4] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 70 - SIDEXIS 4].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique ou une relation intermaxillaire statique.

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Régions du volume**.

▶ SICAT Function affiche sous **Propriétés** l'option **Mouvement axé sur les condyles** :



2. Déplacez le curseur de réglage de l'option **Mouvement axé sur les condyles** sur la position **Activé**.

▶ La vue **3D** représente le mouvement axé sur les condyles.

30 VALEURS D'ARTICULATEUR



Une mauvaise orientation du volume, une détermination erronée du point incisif peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. Assurez-vous que la radiographie 3D est alignée de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure soit parallèle aux coupes axiales.
2. Assurez-vous que vous ayez sélectionné une relation intermaxillaire dans laquelle les dents du patient sont en occlusion de sorte que les plans d'occlusion des mâchoires supérieure et inférieure correspondent.
3. Assurez-vous que le point incisif dans le logiciel repose sur le point incisif anatomique correct entre les incisives inférieures centrales.



Une définition insuffisamment précise du triangle de Bonwill peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. Assurez-vous que vous ayez la définition du triangle de Bonwill conformément aux repères anatomiques corrects.
2. Assurez-vous que la définition du triangle de Bonwill est adaptée à l'objectif prévu.



L'utilisation de données de mouvement de la mâchoire incorrectes peut entraîner le calcul erroné de l'axe charnière.

Utilisez exclusivement un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé pour le calcul de l'axe charnière.

SICAT Function vous aide à déterminer les valeurs d'articulateur propres au patient. Vous pouvez construire et fabriquer des restaurations individuelles en transmettant les valeurs à un articulateur. Actuellement, l'établissement des paramètres pour les articulateurs, qui utilisent le plan d'occlusion comme niveau de référence, est optimisé.

L'articulateur virtuel du logiciel CEREC (Dentsply Sirona) est un exemple d'articulateur qui utilise le plan d'occlusion comme niveau de référence. Les instructions de service de CEREC comprennent des informations sur la manière de programmer l'articulateur CEREC avec des valeurs individuelles.

APPAREIL DE MESURE DU MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE NÉCESSAIRE

Vous pouvez établir la plupart des valeurs d'articulateur à l'aide d'enregistrements de mouvements de mâchoires. Vous avez besoin d'enregistrements de mouvements de mâchoires d'un type déterminé pour établir des valeurs :

VALEUR D'ARTICULATEUR	ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS DE MÂCHOIRE NÉCESSAIRE
Inclinaison sagittale des voies d'articulation des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite.	Protrusion
Angles de Bennett gauche et droit ainsi que mouvements latéraux immédiats gauche et droit.	Latérotursions gauche et droite

VALEUR D'ARTICULATEUR	ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS DE MÂCHOIRE NÉCESSAIRE
Axe charnière	Mouvement d'ouverture réalisé ou mouvement de fermeture réalisé

VALEURS POUR L'ARTICULATEUR CEREC

Vous pouvez établir les valeurs suivantes pour l'articulateur CEREC avec SICAT Function.

PARAMÈTRES DE L'ARTICULATEUR CEREC	DESCRIPTION
Côté	Les côtés sont les distances du condyle gauche ou droit par rapport au point incisif entre les incisives inférieures centrales. SICAT Function indique les longueurs du côté directement sur le triangle de Bonwill.
Base	La base est la distance entre les condyles gauche et droit (distance intercondylienne). SICAT Function indique la longueur de la base directement sur le triangle de Bonwill.
Angle de Balkwill	L'angle de Balkwill est l'angle entre le plan d'occlusion et le triangle de Bonwill. SICAT Function indique l'angle de Balkwill directement sur le triangle Bonwill.
Inclinaison sagittale des voies d'articulation gauche et droite.	L'inclinaison sagittale des voies d'articulation est l'angle entre la trajectoire de protrusion du condyle gauche ou droit et le plan d'occlusion. Vous pouvez mesurer cet angle dans les vues sagittales de l'espace de travail TMJ à l'aide d'une trajectoire de protrusion. Ce faisant, assurez-vous que les données de radiographie 3D soient alignées horizontalement par rapport au plan d'occlusion de la mâchoire supérieure. À ce propos, observez absolument les consignes de sécurité concernant l'orientation du volume. Mesurez l'angle entre la trajectoire de protrusion des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite ainsi que l'horizontale.
Angles de Bennett gauche et droit	L'angle de Bennett est l'angle entre le mouvement de protrusion et la latérotusion. Vous pouvez mesurer cet angle dans les vues axiales de l'espace de travail TMJ à l'aide d'une latérotusion sur les côtés gauche et droit. Ce faisant, assurez-vous que les radiographies 3D soient alignées horizontalement par rapport au plan d'occlusion de la mâchoire supérieure. À ce propos, observez absolument les consignes de sécurité concernant l'orientation du volume. Mesurez l'angle entre la trajectoire de latérotusion et le plan sagittal.

PARAMÈTRES DE L'ARTICULATEUR CEREC	DESCRIPTION
Mouvements latéraux immédiats gauche et droit	

VISIBILITÉ DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D

Vous pouvez évaluer les valeurs d'articulateur essentiellement à l'aide d'enregistrements de mouvements de mâchoires. Vous ne pouvez pas établir seulement la distance intercondylienne (longueur de « base » du triangle de Bonwill dans l'articulateur CEREC) à partir de données de mouvement de la mâchoire uniquement.

S'il n'est pas possible de voir les articulations temporo-mandibulaires sur la radiographie 3D, vous pouvez établir le côté de « base » du triangle de Bonwill à l'aide de l'axe charnière. Vous pouvez établir l'axe charnière à l'aide d'un mouvement d'ouverture ou un mouvement de fermeture réalisé. L'important à cet égard est que la mâchoire inférieure décrive un mouvement de rotation et ne se déplace pas vers l'avant.

Vous pouvez établir cependant la distance intercondylienne à l'aide de la radiographie 3D. Le tableau suivant indique de quelles données de mouvement de la mâchoire vous avez besoin pour quelle valeur d'articulateur :

	IL EST POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.	IL N'EST PAS POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez utilisé un appareil de radiographie avec un grand champ de vision (FOV) pour la radiographie 3D. 	<p>Vous avez utilisé un appareil de radiographie avec un petit champ de vision (FOV) pour la radiographie 3D.</p> <p>Vous avez effectué une radiographie 3D d'un modèle en plâtre.</p>
Conséquence	Il est possible de placer le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au niveau des condyles sur la radiographie 3D.	Il n'est pas possible de placer le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au niveau des condyles sur la radiographie 3D.

	IL EST POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.	IL N'EST PAS POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.
Étapes nécessaires	Placez le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit dans les vues de coupe de l'espace de travail TMJ . Pour ce faire, orientez-vous selon la position des condyles sur la radiographie 3D.	L'enregistrement d'un mouvement d'ouverture réalisé et d'un mouvement de fermeture réalisé est nécessaire au calcul de l'axe de charnière. Un mouvement d'ouverture ou un mouvement de fermeture réalisé se caractérise en ce que le patient ouvre ou ferme la mâchoire de quelques millimètres et vous manipulez les condyles avec la prise de Lauritzen ou la prise de Dawson de telle sorte que la mâchoire inférieure ne se déplace pas vers l'avant. SICAT Function place le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de telle manière que les deux points de dépistage reposent automatiquement sur l'axe de charnière des articulations temporo-mandibulaires.

LE TRIANGLE DE BONWILL DANS SICAT FUNCTION

Le triangle de Bonwill dans SICAT Function vous aide à établir les valeurs d'articulateur suivantes :

- Côtés gauche et droite [mm]
- Base [mm]
- Angle de Balkwill [°]

La condition préalable à cet effet est que les trois points angulaires du triangle de Bonwill soient correctement placés.

- Point de dépistage gauche
- Point de dépistage droit
- Point incisif

Vous pouvez placer le point incisif dans la vue **3D** dans l'espace de travail **TMJ** en double-cliquant sur le point anatomique correct. Le placement que ce soit du point de dépistage gauche mais également du point de dépistage droit se différencie selon si les condyles sont visibles ou pas sur la radiographie 3D.


Pour savoir comment relever les valeurs d'articulateur, reportez-vous au paragraphe *Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles visibles* [► Page 151 - SIDEXIS 4] ou *Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles invisibles* [► Page 153 - SIDEXIS 4].

30.1 RELEVER DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC DES CONDYLES VISIBLES


RÉGLAGE DU TRIANGLE DE BONWILL AVEC DES CONDYLES VISIBLES

Utilisez les vues de coupe pour les étapes suivantes dans l'espace de travail **TMJ** :

1. Cliquez sur le point de dépistage gauche ou le point de dépistage droit, maintenez enfoncée la touche gauche de la souris et placez le point de dépistage dans le condyle respectif.
2. Placez le point incisif entre les incisives inférieures après avoir double-cliqué sur la position anatomique correcte. Si vous ne pouvez voir aucun point incisif entre les incisives inférieures, sélectionnez un mouvement d'ouverture et ouvrez légèrement la mâchoire. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - *SIDEXIS 4*].

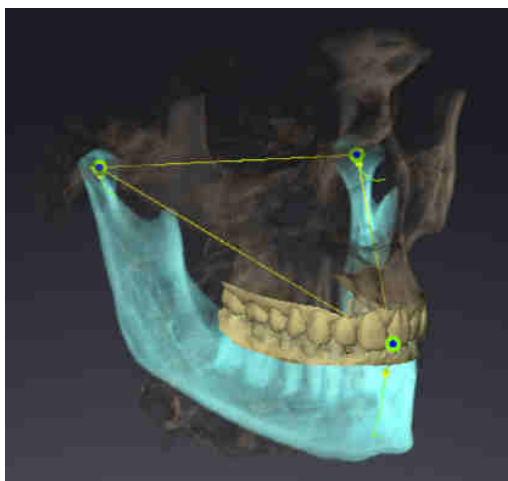

La capture d'écran montre une radiographie 3D avec un grand champ de vision (FOV) dans lequel un triangle de Bonwill est aligné sur l'anatomie du patient. Les condyles sont visibles. Le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit sont placés au centre des condyles visibles. Le point incisif dans SICAT Function est placé entre les incisives inférieures.

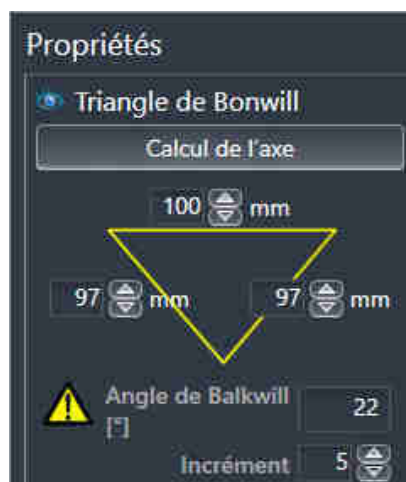

SICAT Function indique les longueurs en mm des côtés du triangle de Bonwill. Vous pouvez noter directement les valeurs de l'articulateur. SICAT Function indique également l'angle de Balkwill. L'angle de Balkwill est valable uniquement pour les mâchoires fermées.

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC CONDYLES VISIBLES

Procédez de la manière suivante pour établir les valeurs d'articulateur :

- Vous avez disposé la radiographie 3D de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure est orienté horizontalement et les mâchoires sont pratiquement symétriques par rapport au plan sagittal médian. Ces alignements corrects sont nécessaires afin que vous puissiez saisir correctement les données et les transmettre dans l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 100 - *SIDEXIS 4*].
- Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Données de mouvement* [► Page 111 - *SIDEXIS 4*].


- ☑ L'espace de travail **TMJ** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 70 - SIDEXIS 4].
 - ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique dans la liste **Relation intermaxillaire active**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].
1. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique le triangle de Bonwill dans l'espace **Propriétés**.
 2. Mettez le point incisif dans la vue **3D** entre les incisives inférieures en double-cliquant sur la position anatomique correcte sur la mâchoire inférieure segmentée ou sur les empreintes optiques. Si le point incisif des incisives inférieures est caché, ouvrez les mâchoires en visionnant le mouvement jusqu'à ce que les incisives inférieures soient visibles. Placez le point incisif en double-cliquant puis refermez les mâchoires.
 3. Mettez le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au centre des condyles en déplaçant les points de dépistage dans les vues coronales, sagittales et axiales.
 4. Assurez-vous que les longueurs des côtés sont symétriques.
 5. Notez les valeurs de base, de côtés (cette valeur est identique des deux côtés) et de l'angle de Balkwill.
 6. Sélectionnez pendant le mouvement de protrusion sélectionné un instant pendant lequel les mâchoires sont fermées. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].
 7. Assurez-vous que les rangées de dents sont fermées.
 8. Mesurez la pente condylienne avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche et l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues sagittales. Notez les valeurs.
 9. Sélectionnez la latérotusion vers la gauche. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues axiales. Notez la valeur.
 10. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.
 11. Sélectionnez la latérotusion vers la droite. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche dans les vues axiales. Notez la valeur.
 12. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.

30.2 RELEVER DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC DES CONDYLES INVISIBLES


RÉGLAGE DU TRIANGLE DE BONWILL AVEC DES CONDYLES INVISIBLES

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé dans la liste **Relation intermaxillaire active**.
2. Cliquez sur le bouton **Calcul de l'axe**.
 - ▶ SICAT Function montre l'axe calculé sous forme d'une ligne pointillée dans la vue **3D**. SICAT Function place automatiquement le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de manière à ce que les deux points de dépistage se trouvent sur l'axe de charnière calculé dans l'espace de travail **TMJ**.
 - ▶ Si vous sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**, SICAT Function affiche l'axe calculé dans la zone **Propriétés**.

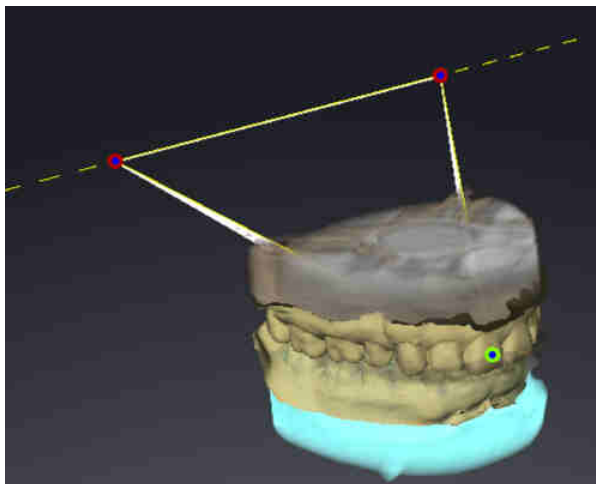

La capture d'écran montre en exemple un scan de modèle en plâtre sur lequel les condyles ne sont pas visibles. L'axe de charnière a été établi à partir d'un mouvement d'ouverture réalisé. La ligne en pointillé esquisse l'axe calculé. SICAT Function a placé automatiquement le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de telle manière que les deux points de dépistage se trouvent sur l'axe calculé. Le point incisif dans SICAT Function est placé entre les incisives inférieures.

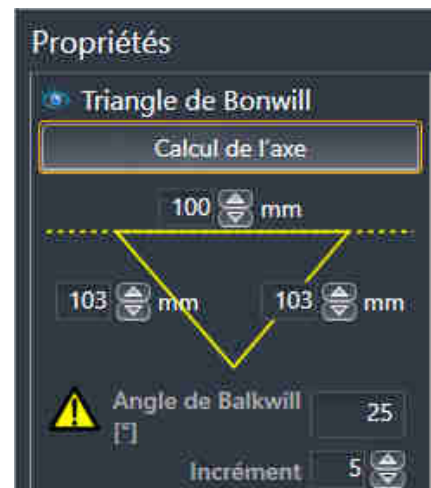

SICAT Function indique les longueurs en mm des côtés du triangle de Bonwill. Vous pouvez noter directement les valeurs de l'articulateur. SICAT Function indique également l'angle de Balkwill. L'angle de Balkwill est valable uniquement pour les mâchoires fermées.

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC CONDYLES INVISIBLES

Procédez de la manière suivante pour établir les valeurs d'articulateur :

- ☑ Vous avez disposé la radiographie 3D de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure est orienté horizontalement et les mâchoires sont pratiquement symétriques par rapport au plan sagittal médian. Ces alignements corrects sont nécessaires afin que vous puissiez saisir correctement les données et les transmettre dans l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 100 - SIDEXIS 4].
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Données de mouvement* [► Page 111 - SIDEXIS 4].
- ☑ L'espace de travail **TMJ** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 70 - SIDEXIS 4].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique dans la liste **Relation intermaxillaire active** . Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].

1. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique le triangle de Bonwill dans l'espace **Propriétés**.
2. Mettez le point incisif dans la vue **3D** entre les incisives inférieures en double-cliquant sur la position anatomique correcte sur la mâchoire inférieure segmentée ou sur les empreintes optiques. Si le point incisif des incisives inférieures est caché, ouvrez les mâchoires en visionnant le mouvement jusqu'à ce que les incisives inférieures soient visibles. Placez le point incisif en double-cliquant puis refermez les mâchoires.
3. Sélectionnez un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé dans la liste **Relation intermaxillaire active** .
4. Dans la zone **Propriétés**, cliquez sur le bouton **Calcul de l'axe**. Si nécessaire, fixez la longueur de la base sur la valeur moyenne de 100 mm.
5. Assurez-vous que les longueurs des côtés sont symétriques.
6. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique les valeurs pour la base, les côtés et l'angle de Balkwill dans la zone **Propriétés**.
7. Notez les valeurs de base, de côtés (les deux valeurs gauche et droite doivent être identiques pour la programmation de l'articulateur) et de l'angle de Balkwill.
8. Sélectionnez un mouvement de protrusion. Sélectionnez pendant le mouvement de protrusion un instant pendant lequel les mâchoires sont fermées. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].
9. Assurez-vous que les rangées de dents sont fermées.
10. Mesurez la pente condylienne avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche et l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues sagittales. Notez les valeurs.

11. Sélectionnez la latérotusion vers la gauche. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues axiales. Notez la valeur.
12. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.
13. Sélectionnez la latérotusion vers la droite. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche dans les vues axiales. Notez la valeur.
14. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Notez la valeur.

31 MESURES DE DISTANCES ET D'ANGLES

Deux types de mesure sont disponibles dans SICAT Function :



- Mesures de distances



- Mesures d'angles

Les outils dédiés aux mesures sont disponibles dans l'étape **Diagnostiquer** de la **Barre d'outils de flux de travail**. Vous pouvez ajouter des mesures dans toutes les vues de coupes 2D. Chaque fois que vous ajoutez une mesure, SICAT Function l'ajoute aussi au groupe **Mesures** dans le **Navigateur d'objets**.




Vous ne pouvez pas ajouter d'objets de mesure dans la **Fenêtre d'examen**.

Les actions suivantes sont disponibles pour les mesures :

- *Ajouter des mesures de distances* [► Page 157 - SIDEXIS 4]
- *Ajouter des mesures d'angles* [► Page 158 - SIDEXIS 4]
- *Déplacer des mesures, des points de mesure et des valeurs de mesure* [► Page 160 - SIDEXIS 4]
- Activer, masquer et afficher des mesures - vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4].
- Focaliser, supprimer les mesures, annuler et répéter les manipulations des mesures - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 64 - SIDEXIS 4].

31.1 AJOUTER DES MESURES DE DISTANCES

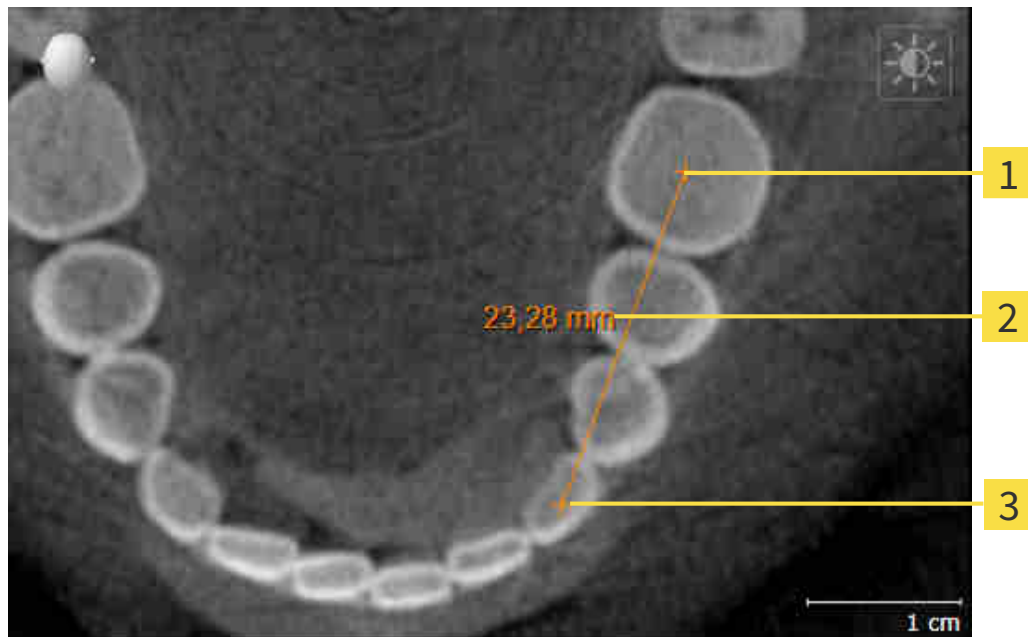

1 Point initial

2 Valeur de mesure

3 Point final

Procédez de la manière suivante pour ajouter une mesure de distance :

L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.




1. Cliquez dans l'étape de travail **Diagnostiquer** sur l'icône **Ajouter une mesure de distance (D)**.
 - ▶ SICAT Function ajoute une nouvelle mesure de distance au **Navigateur d'objets**.
2. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
3. Cliquez sur le point initial de la mesure de distance.
 - ▶ SICAT Function représente le point initial par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function affiche une ligne de distance entre le point initial et le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function visualise la distance actuelle séparant le point initial du pointeur de la souris au milieu de la ligne de distance ainsi que dans le **Navigateur d'objets**.
4. Amenez le pointeur de la souris sur le point final de la mesure de distance puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente le point final par une petite croix.



Vous pouvez à tout moment annuler l'ajout de mesures en appuyant sur **Échap**.

31.2 AJOUTER DES MESURES D'ANGLES

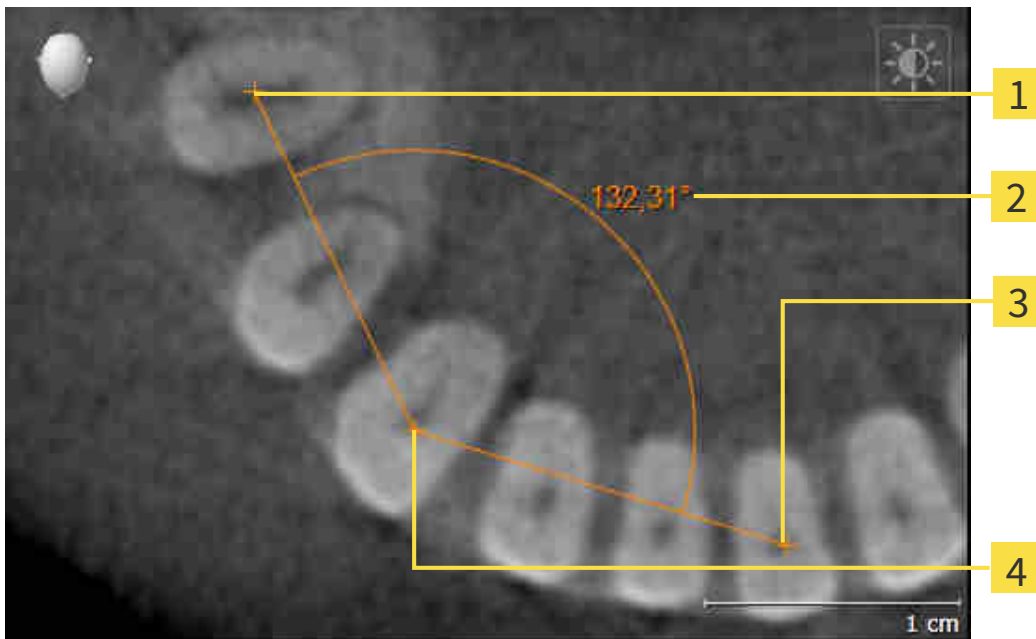

1 Point initial

2 Valeur de mesure

3 Point final

4 Sommet

Procédez de la manière suivante pour ajouter une mesure d'angle :

L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.



1. Cliquez dans l'étape de travail **Diagnostiquer** sur l'icône **Ajouter une mesure d'angle (A)**.
 - ▶ SICAT Function ajoute une nouvelle mesure d'angle au **Navigateur d'objets**.
2. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
3. Cliquez sur le point initial de la mesure d'angle.
 - ▶ SICAT Function représente le point initial par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function représente le premier côté de la mesure d'angle par une ligne entre le point initial et le pointeur de la souris.
4. Amenez le pointeur de la souris sur le sommet de l'angle à mesurer puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente le sommet par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function représente le deuxième côté de la mesure d'angle par une ligne entre le sommet de l'angle et le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function visualise l'angle actuel entre les deux côtés de la mesure d'angle ainsi que dans le **Navigateur d'objets**.

5. Amenez le pointeur de la souris sur le point final du deuxième côté de l'angle puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.

► SICAT Function représente le point final par une petite croix.



Vous pouvez à tout moment annuler l'ajout de mesures en appuyant sur **Échap**.

31.3 DÉPLACER DES MESURES, DES POINTS DE MESURE ET DES VALEURS DE MESURE

DÉPLACER DES MESURES

Procédez de la manière suivante pour déplacer une mesure :

SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 64 - SIDEXIS 4].

1. Amenez le pointeur de la souris sur une ligne de la mesure.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position de la mesure voulue.
 - La mesure suit le déplacement de la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle de la mesure.

DÉPLACER DES POINTS DE MESURE INDIVIDUELS

Procédez de la manière suivante pour déplacer un point de mesure individuel :

SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 62 - SIDEXIS 4] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 64 - SIDEXIS 4].

1. Amenez le pointeur de la souris sur le point de mesure de votre choix.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position du point de mesure voulue.
 - Le point de mesure suit le déplacement de la souris.
 - La valeur de mesure change à mesure que vous déplacez la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle du point de mesure.

DÉPLACER DES VALEURS DE MESURE

Procédez de la manière suivante pour déplacer une valeur de mesure :

☑ SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [▶ Page 62 - SIDEXIS 4] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [▶ Page 64 - SIDEXIS 4].

1. Amenez le pointeur de la souris sur la valeur de mesure de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position de la valeur de mesure voulue.
 - ▶ La valeur de mesure suit le déplacement de la souris.
 - ▶ SICAT Function affiche une ligne pointillée entre la valeur de mesure et la mesure correspondante.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la position actuelle du point de mesure.



Une fois que la valeur d'une mesure a été déplacée, SICAT Function attribue une position absolue à la valeur de mesure. Pour restaurer la position relative de la valeur de mesure, vous pouvez double-cliquer sur la valeur.

32 *EXPORTATION DE DONNÉES*

Vous pouvez exporter des données.

Lorsque SICAT Suite s'exécute en tant que module SIDEXIS 4, veuillez utiliser les fonctions de SIDEXIS prévues à cet effet pour l'exportation des données. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de SIDEXIS 4.

33 PROCESSUS DE COMMANDE

Procédez de la manière suivante pour commander le produit souhaité :

- Dans SICAT Function, définissez une position thérapeutique et insérez les données de planification de gouttières thérapeutiques souhaitées dans le panier. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [▶ Page 164 - SIDEXIS 4] et *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [▶ Page 166 - SIDEXIS 4].
- Contrôlez le panier et lancez la commande. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 171 - SIDEXIS 4].
- Terminez la commande soit directement sur l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite, soit sur un autre ordinateur doté d'une connexion Internet active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Terminer une commande via une connexion Internet active* [▶ Page 172 - SIDEXIS 4] ou *Terminer une commande sans connexion Internet active* [▶ Page 176 - SIDEXIS 4].



Vous pouvez ajouter au panier des commandes qui correspondent à la même radiographie 3D.

33.1 DÉFINIR UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour définir une position thérapeutique :

- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 113 - SIDEXIS 4].
 - ☑ Vous avez déjà importé des empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4] et *Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT* [► Page 132 - SIDEXIS 4].
1. Si vous souhaitez définir une position thérapeutique sur la base d'une relation intermaxillaire statique, sélectionnez une relation intermaxillaire statique dans la liste **Relation intermaxillaire active** . Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].
 2. Si vous souhaitez définir une position thérapeutique sur la base d'un mouvement de la mâchoire, sélectionnez un mouvement de la mâchoire dans la liste **Relation intermaxillaire active** et sautez à la position souhaitée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 135 - SIDEXIS 4].



3. Cliquez sur le bouton **Position thérapeutique**.
 - Si vous avez sélectionné une position thérapeutique basée sur un mouvement de la mâchoire, SICAT Function place un signet à la position correspondante.
 - Le bouton **Position thérapeutique** se change en bouton **Supprimer la position thérapeutique**.
 - SICAT Function enregistre la position thérapeutique sélectionnée pour la commande d'une gouttière thérapeutique.

SUPPRIMER UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour supprimer une position thérapeutique définie :

- ☑ Vous avez sélectionné la relation intermaxillaire statique ou le signet d'un mouvement de la mâchoire sur laquelle ou lequel est basée la position thérapeutique définie.



1. Cliquez sur le bouton **Supprimer la position thérapeutique**.
 - SICAT Function ouvre une fenêtre de notification affichant le message suivant : **Voulez-vous vraiment supprimer la position thérapeutique**
2. Si vous voulez réellement supprimer la position thérapeutique, cliquez sur **Poursuivre**.

ÉCRASER UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour écraser une position thérapeutique définie :

Vous avez déjà défini une position thérapeutique.

1. Sélectionnez une relation intermaxillaire statique ou une position d'un mouvement de la mâchoire qui ne correspond pas à la position thérapeutique définie.




2. Cliquez sur le bouton **Position thérapeutique**.


► SICAT Function ouvre une fenêtre de notification affichant le message suivant : **Une position thérapeutique a déjà été définie. Si vous poursuivez, la position sera écrasée**

3. Cliquez sur **Poursuivre** si vous voulez réellement écraser la position thérapeutique.
poursuivez avec *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [► Page 166 - SIDEXIS 4].

33.2 AJOUTER DES GOUTTIÈRES THÉRAPEUTIQUES AU PANIER

ATTENTION  **Des données de commande incorrectes peuvent entraîner une commande erronée.**

Lorsque vous procédez à une commande, assurez-vous que vous sélectionnez et transmettez les données correctes pour cette commande.

ATTENTION  **Une commande erronée peut entraîner un traitement erroné.**

1. Vérifiez votre commande avant de l'envoyer.
2. Confirmez la planification correcte de votre commande.

Vous trouverez des informations générales sur le processus de commande dans *Processus de commande* [► Page 163 - SIDEXIS 4].

Dans SICAT Function, la première partie du processus de commande consiste à insérer une gouttière thérapeutique dans le panier. Pour pouvoir insérer une gouttière thérapeutique dans le panier, vous devez remplir certaines conditions préalables. Si vous n'avez pas rempli toutes les conditions nécessaires, SICAT Function vous en informe.

SI LES CONDITIONS REQUISES NE SONT PAS REMPLIES

- ☑ L'étape de flux de travail **Commander** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 59 - SIDEXIS 4].


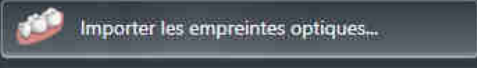

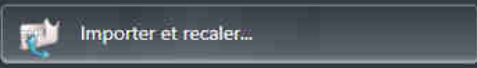




1. Cliquez sur l'icône **Commander la gouttière thérapeutique**.

► La fenêtre **Commande incomplète** s'ouvre :

Commande incomplète

Raison :
Quelques informations requises manquent. Veuillez ajouter les informations manquantes signalées ci-dessous.

Empreintes optiques		 (recommandation)
Données de mouvement		
Position thérapeutique		Veuillez sélectionner une position thérapeutique dans la liste des relations intermaxillaires.

 Fermer



2. Si vous n'avez pas encore importé d'empreintes optiques, cliquez sur le bouton **Importer et recaler** et importez les empreintes optiques correspondant à la radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recaler les empreintes optiques* [► Page 125 - SIDEXIS 4].



3. Si vous n'avez pas encore importé de données de mouvement de la mâchoire, cliquez sur le bouton **Importer et recaler** et importez des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recaler des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 113 - SIDEXIS 4].
4. Si vous n'avez pas encore défini de position thérapeutique, fermez la fenêtre **Commande incomplète** et définissez une position thérapeutique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [► Page 164 - SIDEXIS 4].



Il est possible que vous deviez adapter l'orientation du volume et la courbe panoramique avant d'importer les empreintes optiques. Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** directement depuis la fenêtre **Importer et recaler les empreintes optiques** à l'étape **Enregistrer** en cliquant sur le bouton **Adapter la zone panoramique**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter la zone panoramique* [► Page 108 - SIDEXIS 4].



Si vous souhaitez envoyer à SICAT des modèles en plâtre plutôt que des empreintes optiques, vous pouvez également ajouter des gouttières thérapeutiques sans empreintes optiques au panier, en cliquant sur le bouton **Effectuer la commande sans empreintes optiques (modèles en plâtre nécessaires)** dans la fenêtre **Commande incomplète**. L'étape **Commander une gouttière thérapeutique** affiche alors l'information **Cette commande ne contient pas d'empreintes optiques. Veuillez envoyer les modèles en plâtre correspondants à SICAT.**

SI LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES


- ☑ Vous avez déjà importé des empreintes optiques.
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire.
- ☑ Vous avez déjà défini une position thérapeutique.
- ☑ L'étape de flux de travail **Commander** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 59 - SIDEXIS 4].



- Cliquez sur l'icône **Commander la gouttière thérapeutique**.
- ▶ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** s'ouvre.

VÉRIFIEZ VOTRE COMMANDE DANS LA FENÊTRE "COMMANDER UNE GOUTTIÈRE THÉRAPEUTIQUE"

☑ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** est déjà ouverte :

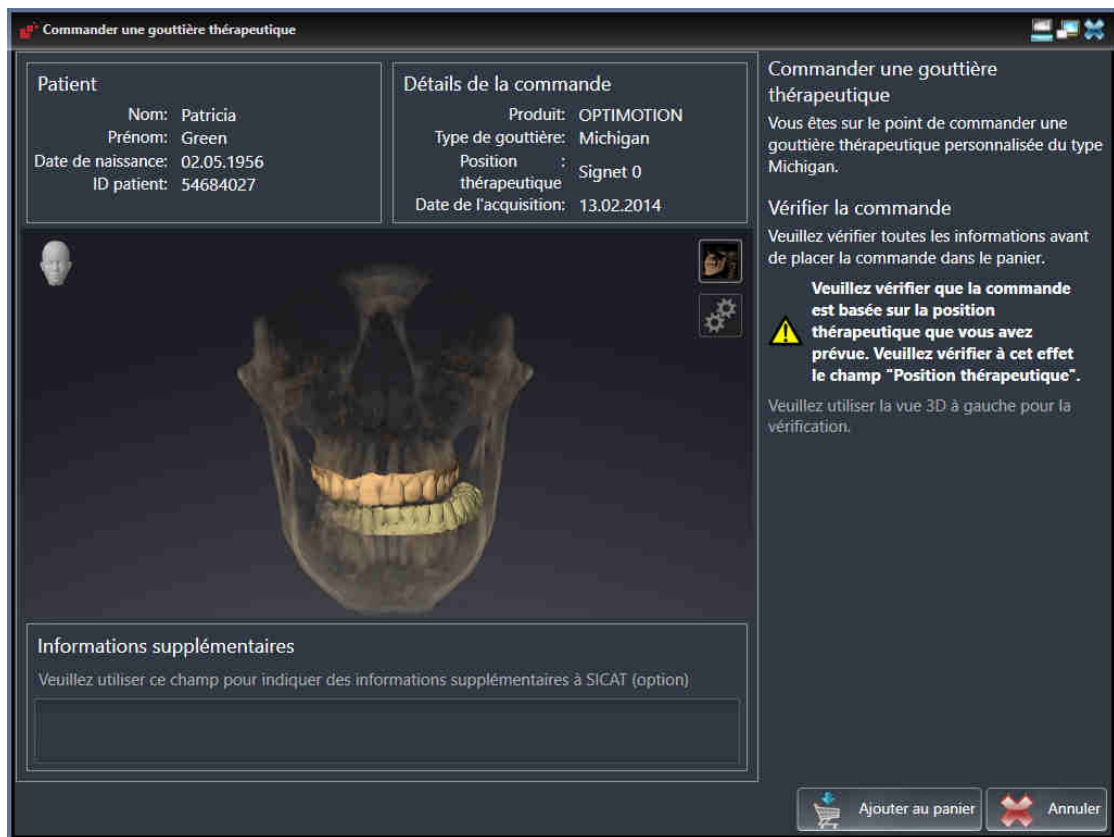

1. Vérifiez dans la zone **Patient** et dans la zone **Détails de la commande** que les informations relatives au patient et à la radiographie sont correctes.
2. Vérifiez dans la vue **3D** que la position thérapeutique est correcte.
3. Si vous le souhaitez, entrez des informations supplémentaires à destination de SICAT dans le champ **Informations supplémentaires**.



4. Cliquez sur le bouton **Dans le panier**.
 - ▶ SICAT Function insère les données de planification de gouttières thérapeutiques souhaitées dans le panier de SICAT Suite.
 - ▶ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ouvre le panier de SICAT Suite.



Tant qu'une commande se trouve dans le panier, vous ne pouvez plus écraser les empreintes optiques, les données de mouvement de la mâchoire et la position thérapeutique d'une planification. Cela ne redeviendra possible qu'après terminaison ou suppression de la commande. Si vous écrasez ou supprimez les empreintes optiques, les données de mouvement de la mâchoire ou la position thérapeutique d'une planification, vous ne pourrez plus commander encore une fois la même gouttière thérapeutique.



Vous pouvez annuler la commande en cliquant sur **Annuler**.

poursuivez avec *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 171 - SIDEXIS 4].


33.3 OUVRIR LE PANIER

- ☑ Le panier contient au moins un produit.
- ☑ Vous avez activé l'affichage du panier dans la phase **Sortie**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de SIDEXIS 4.



- Si le panier n'est pas encore ouvert, cliquez dans la **Barre de navigation** sur le bouton **Panier d'achat**.
- ▶ La fenêtre **Panier d'achat** s'ouvre.

Vous pouvez également cliquer dans la phase **Sortie** sur le bouton **Panier d'achat** :

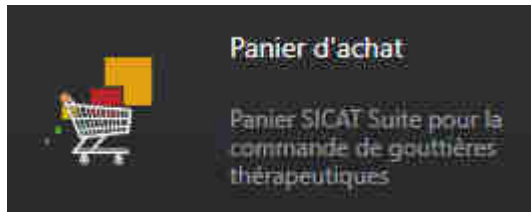


Poursuivez avec l'action suivante :

- *Contrôler le panier et terminer la commande [▶ Page 171 - SIDEXIS 4]*

33.4 CONTRÔLER LE PANIER ET TERMINER LA COMMANDE

- ☑ La fenêtre **Panier d'achat** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir le panier* [► Page 170 - SIDEXIS 4].

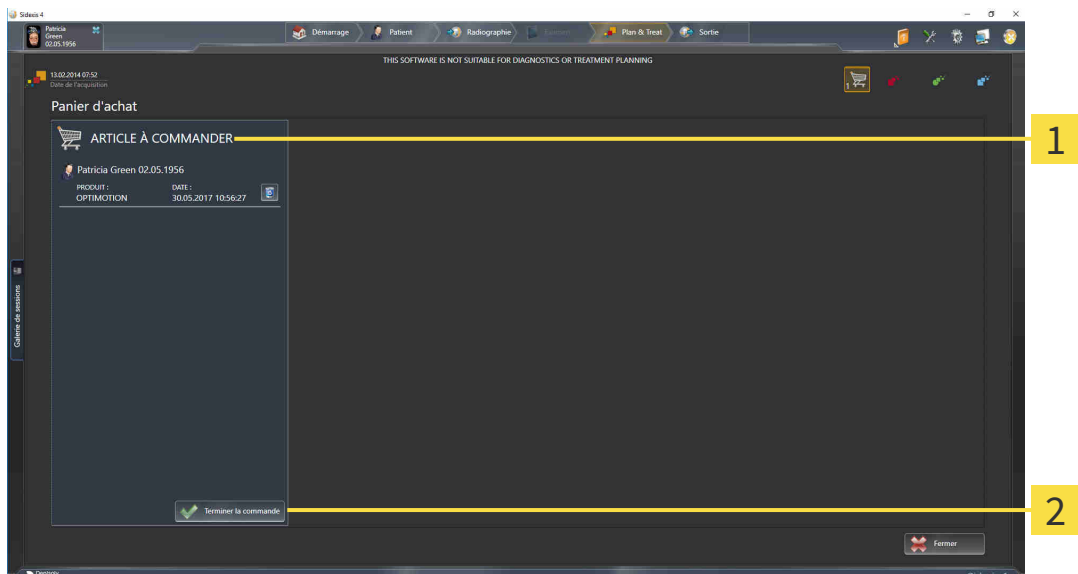

1 Liste **ARTICLE À COMMANDER**

2 Bouton **Terminer la commande**

1. Contrôlez dans la fenêtre **Panier d'achat** si tous les produits souhaités sont contenus.
 2. Cliquez sur le bouton **Terminer la commande**.
- ▶ SICAT Suite met le statut des commandes sur **En préparation** et établit une connexion au serveur SICAT via le SICAT WebConnector.
 - ▶ Avec une connexion Internet active, il n'est plus possible de modifier la commande que dans SICAT Portal.

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Terminer une commande via une connexion Internet active* [► Page 172 - SIDEXIS 4]
- *Terminer une commande sans connexion Internet active* [► Page 176 - SIDEXIS 4]

33.5 TERMINER UNE COMMANDE VIA UNE CONNEXION INTERNET ACTIVE



Sous certaines versions de Windows, il vous faut régler un navigateur standard afin que le processus de commande fonctionne.

- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
 - ☑ SICAT Portal a été ouvert automatiquement dans votre navigateur.
1. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 - ▶ La vue d'ensemble de votre commande s'ouvre et affiche les produits contenus, groupés par patient, ainsi que les prix.
 2. Suivez les instructions dans *Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal* [▶ Page 173 - SIDEXIS 4].
 - ▶ SICAT Suite prépare les données de commande pour le téléchargement.
 - ▶ Au terme des préparatifs, SICAT WebConnector transfère les données de commande sur le serveur SICAT via une connexion cryptée.
 - ▶ Le statut de la commande dans le panier passe à **En chargement**.

Le symbole de l'étude change dans la Timeline de SIDEXIS 4 de manière à ce que l'entrée **Treat** soit mise en relief.



SICAT Suite visualise les commandes tant que le chargement n'est pas terminé. Ceci s'applique également aux commandes qui sont chargées sur d'autres ordinateurs, lorsque plusieurs ordinateurs utilisent le serveur SIDEXIS actuel. Dans le panier, vous pouvez mettre en pause, poursuivre ou annuler le chargement de commandes démarrées sur l'ordinateur actuel



Si vous vous déconnectez de Windows pendant le chargement, SICAT WebConnector met la procédure en pause. Le logiciel poursuit automatiquement le chargement après la nouvelle connexion.

33.6 EXÉCUTER LES ÉTAPES DE COMMANDE DANS SICAT PORTAL

Une fois que vous avez effectué les étapes de commande dans SICAT Suite, SICAT Portal s'ouvre dans votre navigateur Web standard. Dans SICAT Portal, vous avez la possibilité de modifier vos commandes, de sélectionner des fournisseurs qualifiés pour la fabrication et de consulter les prix des produits.

Procédez de la manière suivante pour exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal :

1. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
2. Contrôlez si les produits souhaités sont contenus.
3. Si nécessaire, supprimez des patients et, par la même occasion, les produits associés, de la vue d'ensemble de la commande. Lors de la finalisation de la commande, SICAT Suite reprend les modifications que vous avez effectuées dans SICAT Portal.
4. Vérifiez si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont correctes. Modifiez-les, si nécessaire.
5. Choisissez la méthode d'expédition souhaitée.
6. Acceptez les conditions générales de vente et envoyez la commande.



Vous pouvez supprimer des patients et toutes les gouttières associées de SICAT Portal en sélectionnant un patient et en cliquant sur le bouton de suppression de patients. Dans le panier, vous avez à nouveau pleinement accès à l'ensemble des produits.

33.7 SICAT WEBCONNECTOR



Le SICAT WebConnector nécessite des ports déterminés pour la communication avec le serveur SICAT. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Configuration système requise* [► Page 10 - SIDEXIS 4].



Sous certaines versions de Windows, il vous faut régler un navigateur standard afin que le processus de commande fonctionne.


Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite dispose d'une connexion Internet active, SICAT Suite transmet vos commandes sous forme cryptée, en tâche de fond, via le SICAT WebConnector. SICAT Function affiche le statut des transferts directement dans le panier et peut mettre le SICAT WebConnector en pause. SICAT WebConnector poursuit le transfert même lorsque vous avez fermé SICAT Suite. S'il n'est pas possible d'effectuer le chargement comme souhaité, vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur du SICAT WebConnector.

OUVRIR LA FENÊTRE "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- Cliquez dans la zone de notification de la barre des tâches sur l'icône **SICAT Suite WebConnector**.

► La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** s'ouvre :

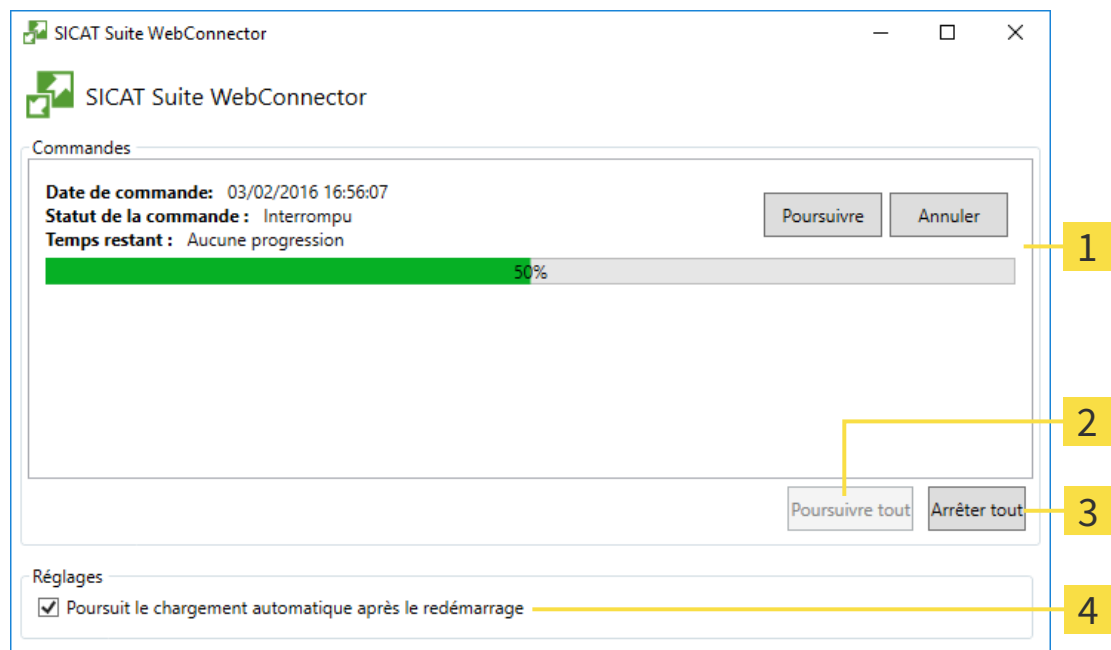

1 Liste **Commandes**

3 Bouton **Interrompre tous**

2 Bouton **Poursuivre tous**

4 Case à cocher **Poursuite automatique du chargement après le redémarrage**

La liste **Commandes** affiche la file d'attente de la commande.

INTERROMPRE ET POURSUIVRE LE CHARGEMENT

Vous pouvez interrompre la procédure de chargement. Ceci peut s'avérer utile lorsque votre liaison Internet est surchargée. Les réglages ne s'appliquent qu'aux procédures de chargement dans SICAT WebConnector. Les procédures de chargement via le navigateur Web ne sont pas concernées.

La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** est déjà ouverte.

1. Cliquez sur le bouton **Interrompre tous**.
 - ▶ SICAT WebConnector interrompt le chargement de toutes les commandes.
2. Cliquez sur le bouton **Poursuivre tous**.
 - ▶ SICAT WebConnector poursuit le chargement de toutes les commandes.

DÉSACTIVER LA POURSUITE AUTOMATIQUE APRÈS UN REDÉMARRAGE

Vous pouvez éviter que SICAT WebConnector ne poursuive automatiquement le chargement après un redémarrage de Windows.

La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** est déjà ouverte.

- Désactivez la case à cocher **Poursuite automatique du chargement après le redémarrage**.
- ▶ Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, SICAT WebConnector ne poursuit pas automatiquement le chargement de vos commandes.

33.8 TERMINER UNE COMMANDE SANS CONNEXION INTERNET ACTIVE

SICAT Suite ouvre la fenêtre **Erreur lors de la connexion au serveur SICAT** quand l'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute ne peut pas établir une connexion avec le serveur SICAT. La fenêtre vous indique une des causes suivantes du problème :

- **Aucune connexion Internet n'est disponible SICAT WebConnector n'a pas pu établir la connexion au serveur SICAT**
- **Le portail SICAT n'est pas accessible**
- **Le service « SICATWebConnector » n'est pas installé**
- **Le service « SICATWebConnector » n'est pas démarré**
- **Une erreur inconnue s'est produite. SICAT WebConnector n'a pas pu établir la connexion au serveur SICAT**

Ce chapitre montre uniquement les captures d'écran pour le cas où il n'y a aucune connexion Internet disponible.

Le paragraphe Causes indique des étapes possibles pour éliminer le problème.

Sinon, vous pouvez télécharger une commande sur un autre ordinateur avec une connexion Internet active par un navigateur Web à des fins de dépannage. En cas de commande par navigateur Web, SICAT Suite exporte tous les produits du panier à la fois, et crée un sous-dossier par patient. Chaque sous-dossier comprend un fichier XML avec les informations concernant la commande et une archive Zip avec les données dont SICAT a besoin pour la production. Vous pouvez ensuite télécharger consécutivement le fichier XML et l'archive Zip dans SICAT Portal. Le transfert est crypté.

Procédez de la manière suivante pour terminer la commande sans connexion Internet active :


- L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute n'est pas équipé d'une connexion Internet active.
- Une fenêtre affiche le message suivant : **Erreur lors de la connexion au serveur SICAT**



- 1** Bouton **Charger depuis un autre ordinateur**

1. Cliquez sur le bouton **Charger depuis un autre ordinateur**.

► La fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur** s'ouvre :

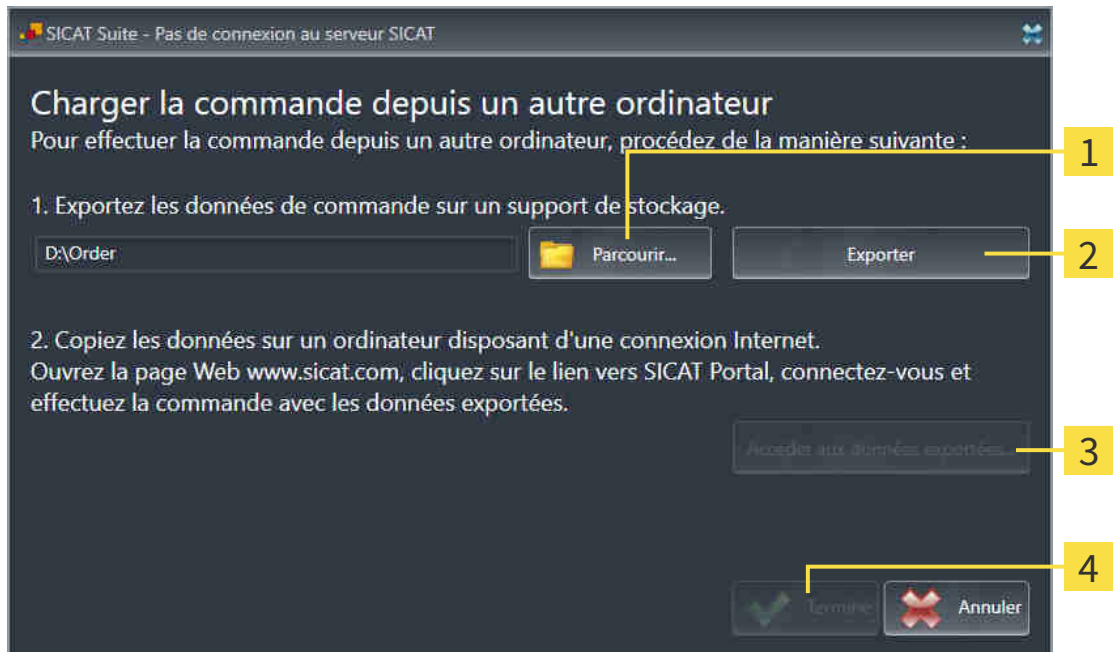

1 Bouton **Parcourir**

3 Bouton **Accéder aux données exportées**

2 Bouton **Exporter**

4 Bouton **Terminé**

2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.

► Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.


3. Sélectionnez un répertoire existant ou créez un nouveau répertoire puis cliquez sur **OK**. Veuillez noter que le chemin du répertoire ne doit pas dépasser 160 caractères.

4. Cliquez sur le bouton **Exporter**.

► SICAT Suite exporte vers le dossier sélectionné tous les fichiers qui sont nécessaires pour la commande du contenu du panier. Ce faisant, SICAT Suite crée un sous-dossier pour chaque patient.

5. Cliquez sur le bouton **Accéder aux données exportées**.

- ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre, qui affiche le répertoire avec les données exportées :

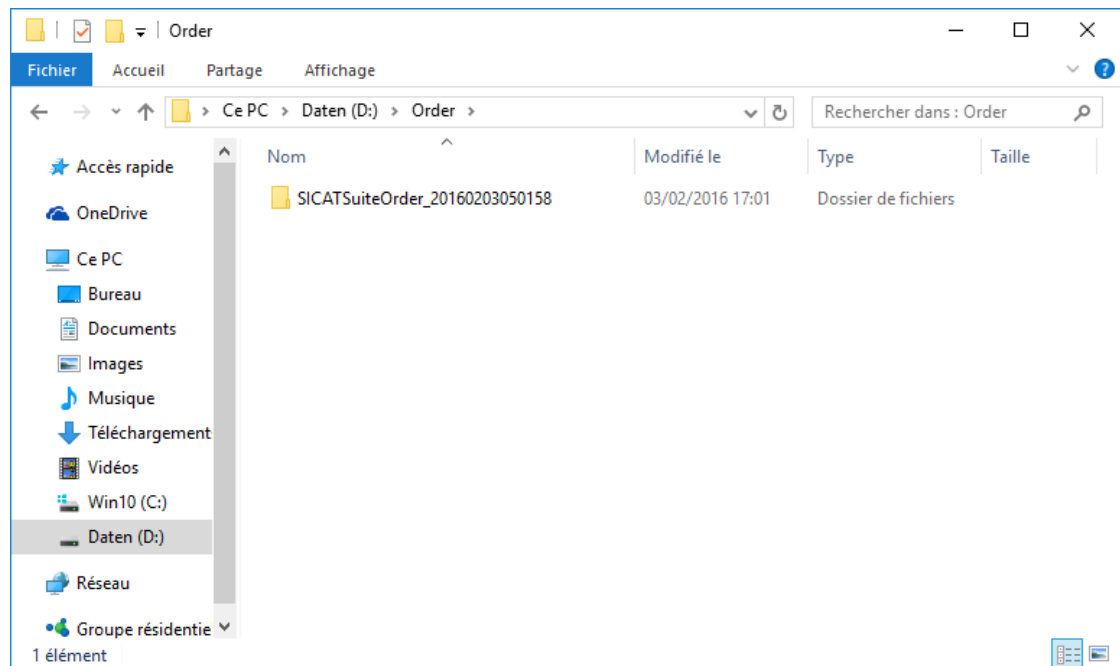

6. Copiez le dossier contenant les données de la gouttière souhaitée sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active, par exemple par l'intermédiaire d'une clé USB.
7. Dans la fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur**, cliquez sur **Terminé**.
 - ▶ SICAT Suite ferme la fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur**.
 - ▶ SICAT Suite supprime du panier tous les produits contenus dans la commande.
8. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.de>.
9. Cliquez sur le lien vers SICAT Portal.
 - ▶ SICAT Portal s'ouvre.
10. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
11. Cliquez sur le lien pour télécharger la commande.
12. Sélectionnez la commande voulue sur l'ordinateur équipé de la connexion Internet active. Il s'agit d'un fichier XML dont le nom commence par **SICATSuiteOrder**.
 - ▶ La vue d'ensemble de votre commande s'ouvre et affiche le patient contenu, les produits correspondants ainsi que le prix.
13. Suivez les instructions dans *Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal* [▶ Page 173 - *SIDEXIS 4*].
14. Cliquez sur le lien pour télécharger les données de planification du produit.

15. Sélectionnez les données de produits sur l'ordinateur équipé de la connexion Internet active. Il s'agit d'une archive ZIP qui se trouve dans le même dossier que le fichier XML précédemment chargé et dont le nom commence par **SICATSuiteExport**.
- Si vous avez exécuté la commande, votre navigateur transfère l'archive contenant les données de produits sur le serveur SICAT via une liaison cryptée.



SICAT Suite ne supprime pas automatiquement les données exportées. Une fois un processus de commande terminé, il est recommandé de supprimer manuellement les données exportées, dans un souci de sécurité.

34 RÉGLAGES



Les versions de SICAT Suite liées à SIDEXIS reprennent de nombreux réglages de SIDEXIS. Vous pouvez visualiser les valeurs de ces réglages dans SICAT Function, mais vous ne pouvez les modifier que dans les réglages de SIDEXIS.

Vous pouvez modifier ou visualiser les réglages généraux dans la fenêtre **Réglages**. Une fois que vous avez cliqué sur le groupe **Réglages**, le menu sur le côté gauche affiche les boutons suivants :

- **Généralités** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utiliser les réglages généraux* [► Page 181 - SIDEXIS 4].
- **Licences** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 48 - SIDEXIS 4].
- **Cabinet** - Visionner ou modifier le logo et le texte d'information de votre cabinet, par ex. pour leur utilisation sur les imprimés. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utiliser les informations sur le cabinet* [► Page 185 - SIDEXIS 4].
- **Visualisation** - Modifier les réglages de visualisation généraux. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 186 - SIDEXIS 4].
- **SICAT Function** - Modifier les réglages spécifiques à une application de SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier les réglages de SICAT Function* [► Page 188 - SIDEXIS 4].

Si vous modifiez les réglages, SICAT Function prend en charge immédiatement les modifications et enregistre les réglages dans votre profil d'utilisateur.



Les réglages de SICAT Suite sont valables pour l'utilisateur actif de la station de travail actuelle. SICAT Suite prend en charge immédiatement les modifications sur les réglages. Lorsque vous passez dans une autre catégorie de réglages, SICAT Suite enregistre également durablement les réglages modifiés.


34.1 UTILISER LES RÉGLAGES GÉNÉRAUX



Les versions de SICAT Suite liées à SIDEXIS reprennent de nombreux réglages de SIDEXIS. Vous pouvez visualiser les valeurs de ces réglages dans SICAT Function, mais vous ne pouvez les modifier que dans les réglages de SIDEXIS.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir les réglages généraux :

1. Cliquez dans la barre de titre de SIDEXIS 4 sur l'icône **Réglages**.
 - ▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.
2. Cliquez sur le groupe **SICAT Suite**.
 - ▶ Le groupe **SICAT Suite** s'ouvre.
3. Cliquez sur le bouton **Généralités**.
 - ▶ La fenêtre **Généralités** s'ouvre :

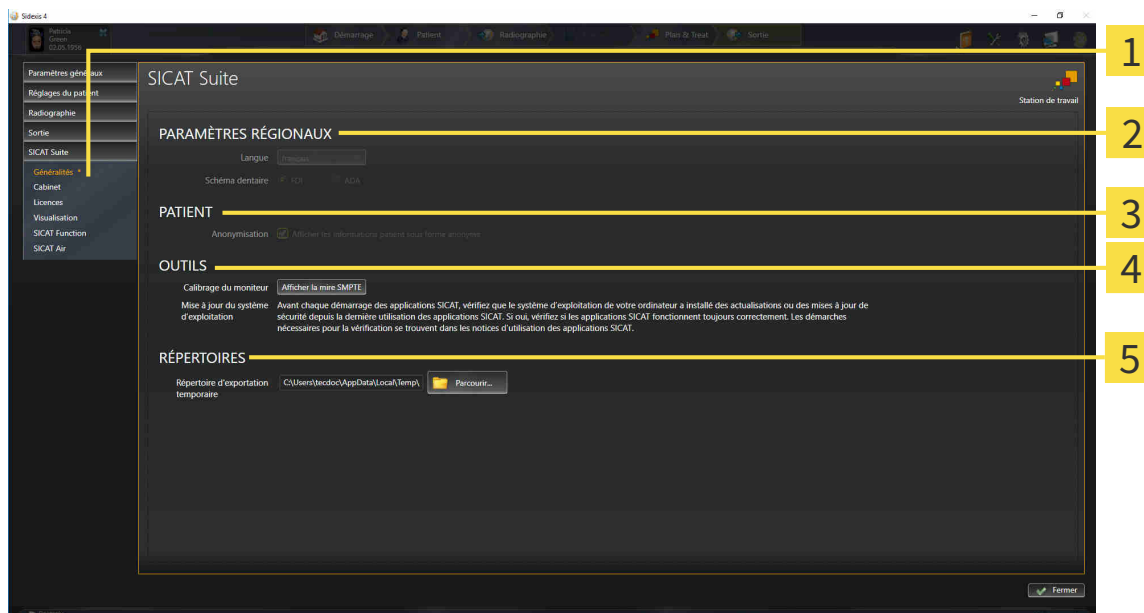

1 Onglet **Généralités**

4 Zone **OUTILS**

2 Zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**

5 Zone **RÉPERTOIRES**

3 Zone **PATIENT**

SICAT Function reprend les réglages suivants de SIDEXIS, que vous pouvez visualiser ici :

- Dans la zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**, vous pouvez visualiser la langue de l'interface utilisateur dans la liste **Langue**.
- Dans la zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**, vous pouvez visualiser le schéma dentaire actuel sous **Schéma dentaire**.
- Dans la zone **PATIENT**, vous pouvez visualiser l'état de la case à cocher **Afficher les informations patient sous forme anonyme**. Lorsque la case est cochée, SICAT Function reprend les données patient anonymisées de SIDEXIS.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- Dans la zone **RÉPERTOIRES**, vous pouvez indiquer dans le champ **Répertoire d'exportation temporaire** un dossier dans lequel SICAT Suite enregistre les données de commande. Vous devez disposer d'un accès sans restriction à ce dossier.

En plus de visionner ou de modifier les réglages généraux, il vous est également possible d'ouvrir la mire SMPTE pour calibrer votre moniteur :

- Cliquez sous **OUTILS** **Calibrage du moniteur**, sur le bouton **Afficher la mire SMPTE**, afin de calibrer votre moniteur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE* [▶ Page 183 - SIDEXIS 4].



Si vous sélectionnez dans SIDEXIS une langue que SICAT Function ne prend pas en charge, SICAT Function affiche les textes de l'interface utilisateur en anglais.



Les schémas dentaires pris en charge sont FDI et ADA.

34.2 CALIBRAGE DU MONITEUR AVEC LA MIRE SMPTE

ATTENTION




Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

Quatre propriétés principales déterminent si votre moniteur est apte à visualiser les données dans les applications SICAT :

- Luminosité
- Contraste
- Résolution spatiale (linéarité)
- Distorsion (aliasing)

La mire SMPTE est une image de référence qui vous permet de contrôler les propriétés de votre moniteur :

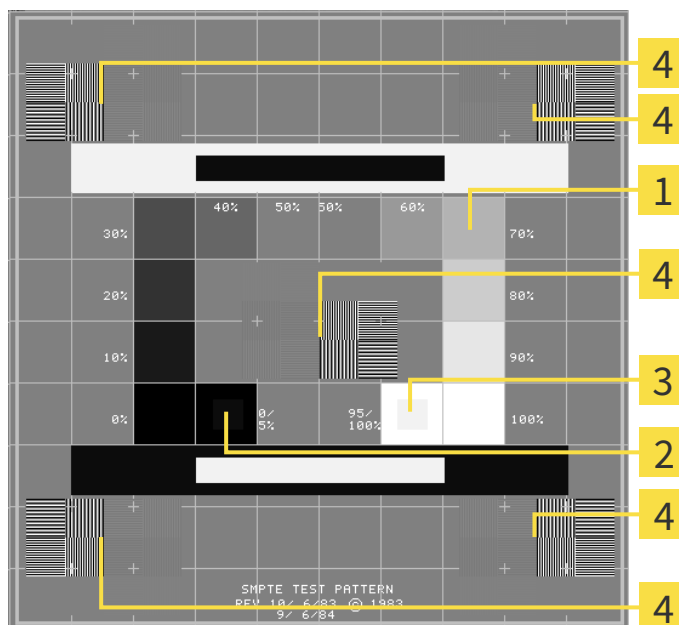

1 Carrés de niveaux de gris

3 Carré 100%

2 Carré 0%

4 Carrés contenant un motif de traits à contraste élevé

CONTRÔLER LA LUMINOSITÉ ET LE CONTRASTE

Au centre de la mire SMPTE, une rangée de carrés indique les niveaux de gris de noir (luminosité 0 %) à blanc (luminosité 100 %) :

- Le carré 0% contient un plus petit carré servant à indiquer la différence de luminosité entre 0 % et 5 %.
- Le carré 100 % contient un plus petit carré servant à indiquer la différence de luminosité entre 95 % et 100 %.

Procédez de la manière suivante pour contrôler ou régler votre moniteur :

- La mire SMPTE est déjà ouverte.
 - Contrôlez si vous pouvez observer la différence visuelle entre le carré intérieur et le carré extérieur dans les carrés 0 % et 100 %. Si nécessaire, modifiez les réglages de votre moniteur.



De nombreux moniteurs peuvent uniquement visualiser la différence de luminosité dans le carré 100 % et pas dans le carré 0 %. Vous pouvez réduire la lumière ambiante afin d'améliorer le pouvoir de distinction des différents niveaux de luminosité dans le carré 0 %.

CONTRÔLER LA RÉOLUTION SPATIALE ET LA DISTORSION

Dans les coins et au centres de la mire SMPTE, 6 carrés affichent un motif de traits à contraste élevé. En ce qui concerne la résolution spatiale et la distorsion, vous devez être en mesure de distinguer entre des lignes horizontales et verticales, de différentes largeurs, alternant le noir et le blanc :

- du plus large au plus étroit (6 pixels, 4 pixels, 2 pixels)
- horizontal et vertical

Procédez de la manière suivante pour contrôler ou régler votre moniteur :

- Contrôlez si vous distinguez toutes les lignes dans les 6 carrés affichant le motif de traits de contraste élevé. Si nécessaire, modifiez les réglages de votre moniteur.

FERMER LA MIRE SMPTE

Procédez de la manière suivante pour fermer la mire SMPTE :

- Appuyez sur la touche **Échap**.
- ▶ La mire SMPTE se ferme.


34.3 UTILISER LES INFORMATIONS SUR LE CABINET

Les versions de SICAT Suite liées à SIDEXIS reprennent le logo du cabinet et le texte d'information de SIDEXIS. Par conséquent, vous pouvez uniquement visualiser les valeurs de ces réglages dans SICAT Suite. Veuillez modifier ces réglages dans SIDEXIS le cas échéant.

Les applications de SICAT Suite utilisent le logo ainsi que les informations affichées ici pour individualiser les imprimés ou les fichiers PDF.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir les informations sur le cabinet :

1. Cliquez dans la barre de titre de SIDEXIS 4 sur l'icône **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.
2. Cliquez sur le groupe **SICAT Suite**.
▶ Le groupe **SICAT Suite** s'ouvre.
3. Cliquez sur le bouton **Cabinet**.
▶ La fenêtre **CABINET** s'ouvre :

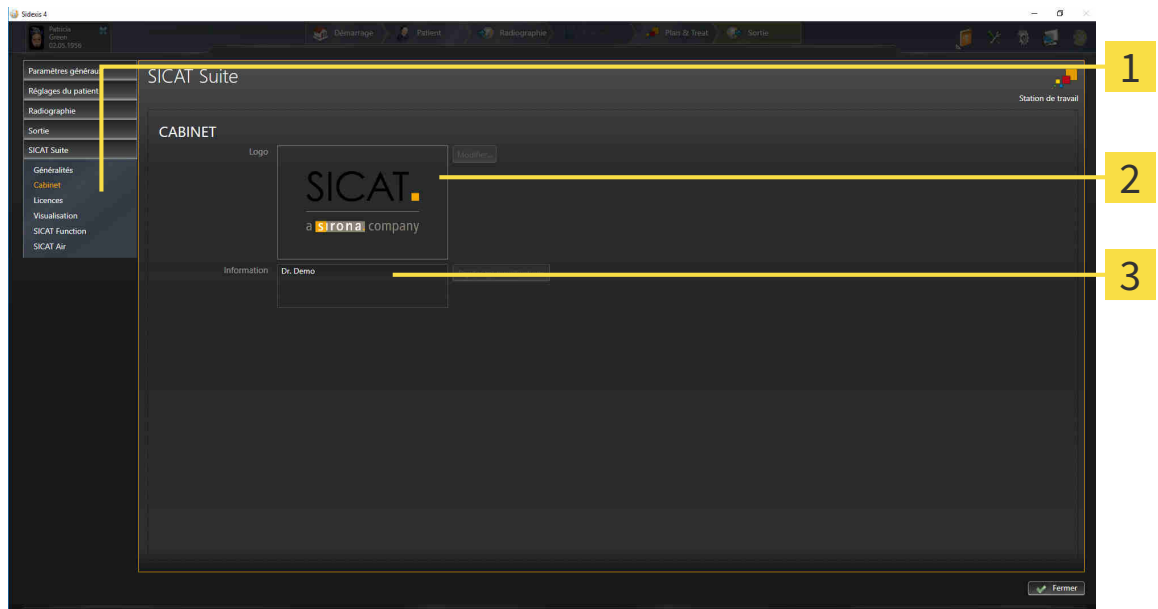

1 Onglet **Cabinet**

2 Zone **Logo**

3 Zone **Information**

Vous pouvez visualiser les réglages suivants :

- Dans la zone **Logo**, vous pouvez visualiser le logo de votre cabinet.
- Dans la zone **Information**, vous pouvez visualiser un texte identifiant votre cabinet, p. ex. le nom et l'adresse.

34.4 MODIFIER LES RÉGLAGES DE VISUALISATION



ATTENTION

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.



ATTENTION

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.


1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

Les réglages de visualisation définissent la visualisation du volume, des objets de diagnostic et des objets de planification dans toutes les applications SICAT.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Visualisation** :

1. Cliquez dans la barre de titre de SIDEXIS 4 sur l'icône **Réglages**.
 - La fenêtre **Réglages** s'ouvre.
2. Cliquez sur le groupe **SICAT Suite**.
 - Le groupe **SICAT Suite** s'ouvre.
3. Cliquez sur le bouton **Visualisation**.

► La fenêtre **Visualisation** s'ouvre :

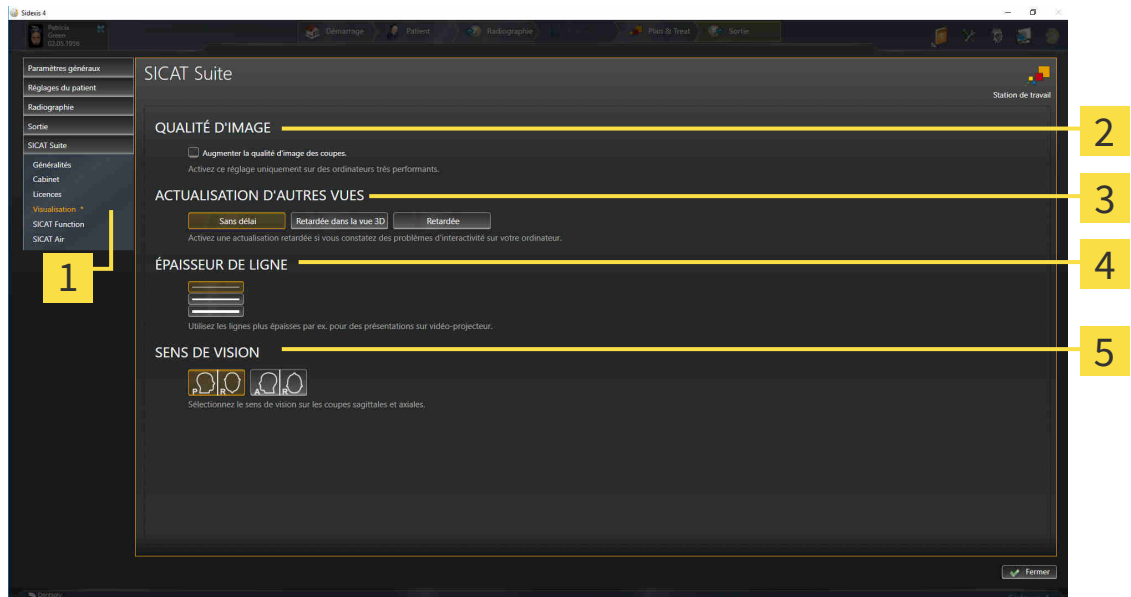

1 Onglet **Visualisation**

4 Zone **ÉPAISSEUR DE LIGNE**

2 Zone **QUALITÉ D'IMAGE**

5 Zone **SENS DE VISION**

3 Zone **ACTUALISATION D'AUTRES VUES**

Les réglages suivants sont disponibles :


- **Augmenter la qualité d'image des coupes** - Améliore la qualité de représentation des coupes, par moyennage des coupes voisines, par le logiciel. Activez ce réglage uniquement sur des ordinateurs très performants.
- **ACTUALISATION D'AUTRES VUES** - L'actualisation retardée améliore l'interactivité de la vue active, au prix d'une actualisation retardée des autres vues. N'activez l'actualisation retardée que si vous constatez des problèmes d'interactivité sur votre ordinateur.
- **ÉPAISSEUR DE LIGNE** - Modifie l'épaisseur des lignes. Des lignes plus épaisses sont utiles pour des présentations sur vidéo-projecteur.
- **SENS DE VISION** - Commute le sens de vision de la vue de coupe **Axial** et de la vue de coupe **Sagittal**.

34.5 MODIFIER LES RÉGLAGES DE SICAT FUNCTION

SICAT Function Les réglages définissent la synchronisation Panoramique et la synchronisation Zoom dans l'espace de travail **TMJ** de SICAT Function.

Procédez de la manière suivante pour modifier les réglages de SICAT Function :

1. Cliquez dans la barre de titre de SIDEXIS 4 sur l'icône **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.
2. Cliquez sur le groupe **SICAT Suite**.
▶ Le groupe **SICAT Suite** s'ouvre.
3. Cliquez sur le bouton **SICAT Function**.
▶ La fenêtre **SICAT Function** s'ouvre :

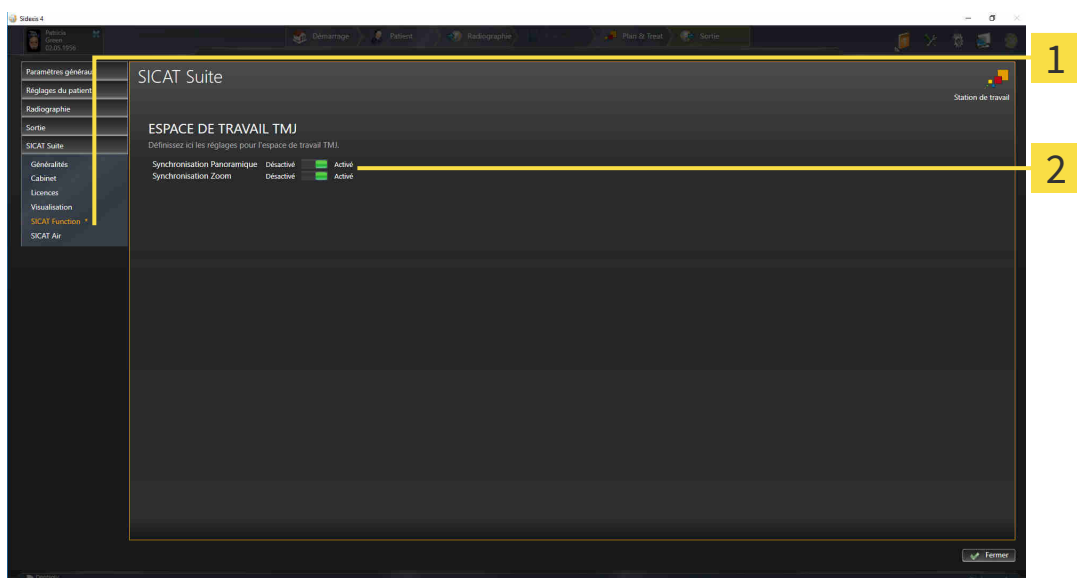

1 Onglet **SICAT Function**

2 Zone **Définissez ici les réglages pour l'espace de travail TMJ**

Les réglages suivants sont disponibles :

- **Synchronisation Panning**
- **Synchronisation Zoom**

Les réglages vous permettent d'activer ou de désactiver le fait que SICAT Function synchronise la panoramisation ou le zoom des vues dans l'espace de travail **TMJ** entre le condyle gauche et le condyle droit.


35 ASSISTANCE

SICAT offre les possibilités d'assistance suivantes :

- Documents PDF
- Informations de contact
- Informations sur le logiciel SICAT Suite installé et les applications SICAT installées

Poursuivez avec l'action suivante :

- *Ouvrir les possibilités d'assistance* [▶ Page 190 - SIDEXIS 4]

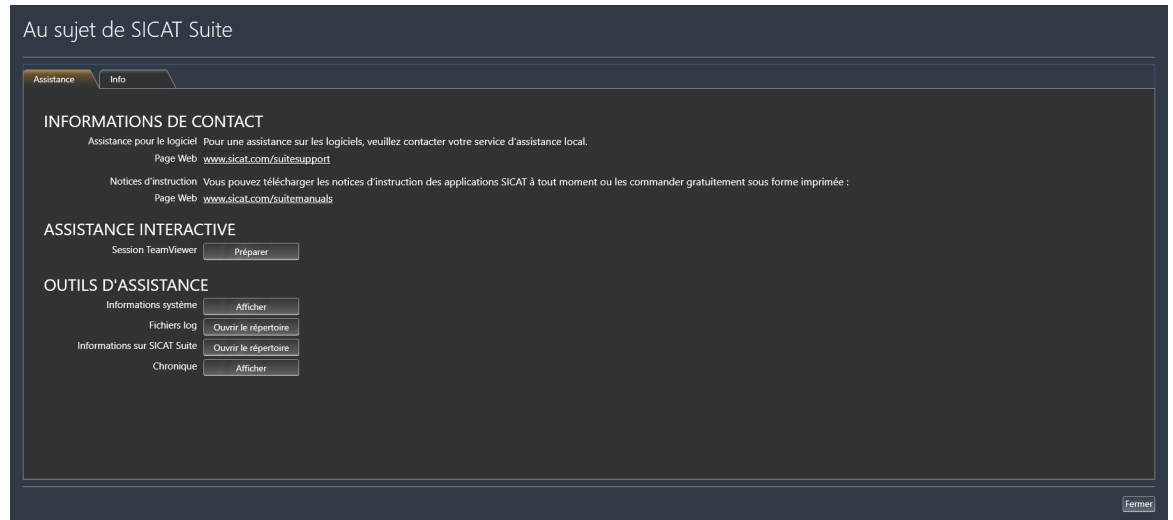

Au sujet de SICAT Suite

Assistance Info

INFORMATIONS DE CONTACT

Assistance pour le logiciel Pour une assistance sur les logiciels, veuillez contacter votre service d'assistance local.
Page Web www.sicat.com/suitesupport

Notices d'instruction Vous pouvez télécharger les notices d'instruction des applications SICAT à tout moment ou les commander gratuitement sous forme imprimée :
Page Web www.sicat.com/suitemanuals

ASSISTANCE INTERACTIVE

Session TeamViewer

OUTILS D'ASSISTANCE

Informations système

Fichiers log

Informations sur SICAT Suite

Chronique

Fermer

35.1 OUVRIR LES POSSIBILITÉS D'ASSISTANCE

Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Informations sur SICAT Suite** :

1. Cliquez sur l'icône **Aide**.
2. Cliquez sur l'entrée **Informations sur SICAT Suite**.


► La fenêtre **Informations sur SICAT Suite** s'ouvre.

La fenêtre **Informations sur SICAT Suite** se compose des onglets suivants :

- **Assistance** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Assistance* [► Page 189 - SIDEXIS 4].
- **Info** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Info* [► Page 192 - SIDEXIS 4].

35.2 INFORMATIONS DE CONTACT ET OUTILS D'ASSISTANCE

La fenêtre **Assistance** contient l'ensemble des informations et des outils utiles à l'assistance SICAT :

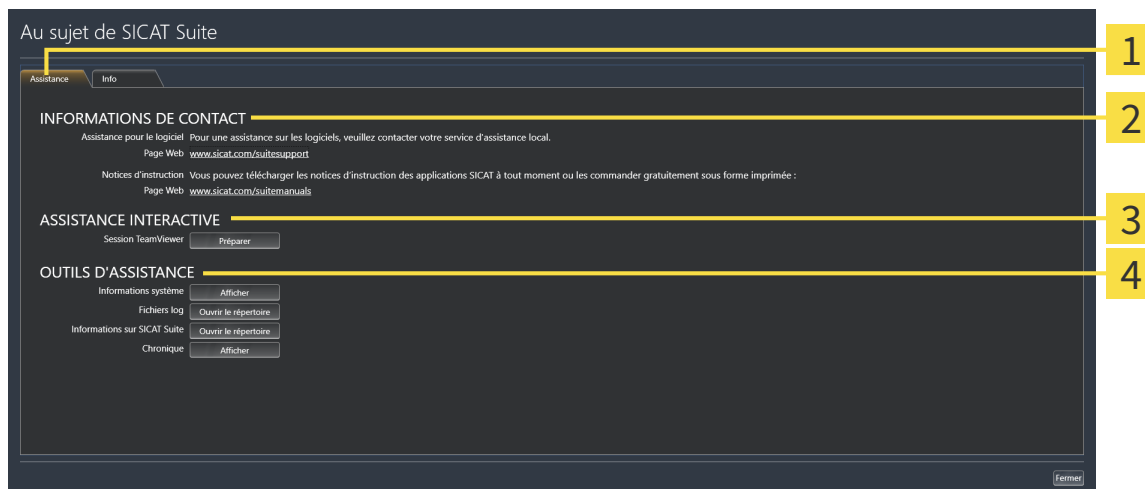

1 Onglet **Assistance**

3 Zone **ASSISTANCE INTERACTIVE**

2 Zone **INFORMATIONS DE CONTACT**

4 Zone **OUTILS D'ASSISTANCE**

La zone **INFORMATIONS DE CONTACT** vous indique comment vous procurer des notices d'instruction.

Les outils suivants sont disponibles dans la zone **ASSISTANCE INTERACTIVE** :

- Lorsque vous cliquez dans la zone **Session TeamViewer** sur le bouton **Préparer**, SICAT Fonction, ouvre une session TeamViewer.


TeamViewer est un logiciel permettant de télécommander les commandes de la souris et du clavier et de transférer le contenu de l'écran d'un ordinateur via une connexion Internet active. TeamViewer n'établit la connexion qu'avec votre accord explicite. À cet effet, vous communiquez à l'assistance SICAT un ID TeamViewer et un mot de passe. L'assistance SICAT est ainsi en mesure de vous aider directement sur site.

Les outils suivants sont disponibles dans la zone **OUTILS D'ASSISTANCE** :

- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations système** sur le bouton **Afficher**, SICAT Fonction, ouvre les informations du système d'exploitation.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Fichiers log** sur le bouton **Ouvrir le répertoire**, SICAT Fonction ouvre le répertoire log de SICAT Suite dans une fenêtre de l'explorateur de fichiers Windows.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations sur SICAT Suite** sur le bouton **Ouvrir le répertoire**, SICAT Fonction exporte des informations sur l'installation actuelle dans un fichier de texte.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations sur SICAT Suite** sur le bouton **Afficher les notifications** SICAT Fonction affiche la fenêtre des notifications.

35.3 INFO

La fenêtre **Info** affiche dans plusieurs onglets des informations sur SICAT Suite et sur toutes les applications SICAT installées :

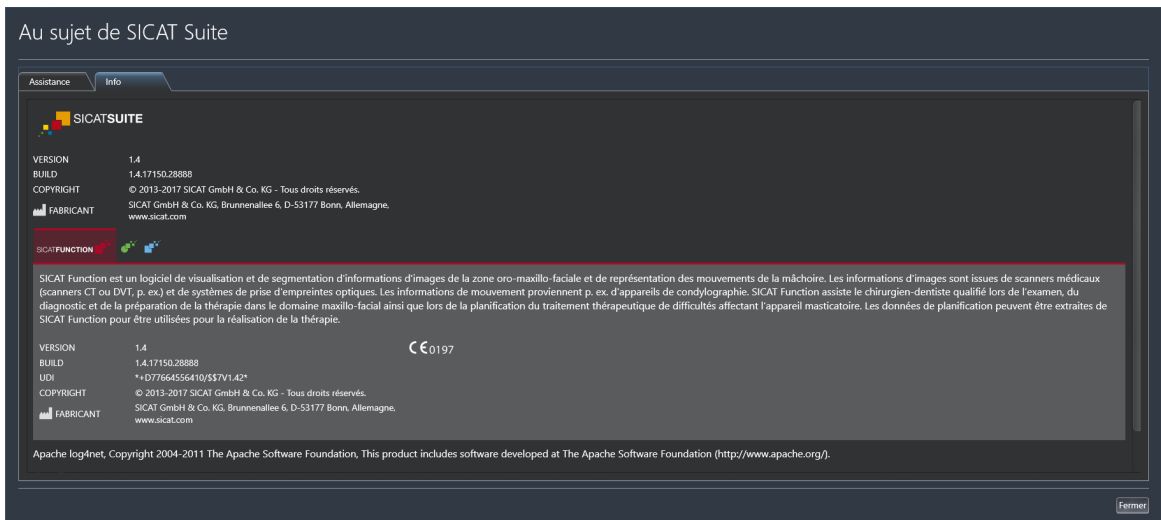

36 OUVRIR LES DONNÉES EN MODE DE LECTURE SEULE

Vous pouvez ouvrir les données en mode de lecture seule

Les données que vous pouvez visualiser dans SICAT Function en tant que module SIDEXIS 4, sans possibilité de les modifier et de les enregistrer, dépendent du statut de la licence :

TYPE DE LA LICENCE SICAT FUNCTION	POSSIBILITÉ DE VISIONNER SANS MODIFIER ?
Aucune	Non
Viewer	Oui
Version complète	Non

Vous pouvez visionner les études SICAT Function aussi sans licence viewer dans les cas suivants :

- Exportez depuis SIDEXIS 4 des études SICAT Function et importez les données vers SIDEXIS sur un autre ordinateur. SICAT Function doit être installé sur cet ordinateur.
- Créez depuis SIDEXIS 4 un paquet Wrap&Go qui contient des études SICAT Function. Installez le paquet Wrap&Go sur un autre ordinateur. Installez ensuite SICAT Function.

Dans les deux cas, vous ne pouvez apporter ou enregistrer aucune modification sur la planification.



Si l'ordinateur sur lequel s'exécutent SIDEXIS 4 et SICAT Suite appartient à un réseau et que SIDEXIS 4 et la configuration du réseau le permettent, SIDEXIS 4 peut faire partie d'une installation multi-station. Ceci a pour conséquence, entre autres, que d'autres stations de travail peuvent vous retirer les droits d'accès aux données ouvertes. Dans ce cas, SIDEXIS 4 ferme immédiatement le jeu de données et vous ne pouvez pas enregistrer les modifications des études SICAT Function.

Procédez de la manière suivante pour visualiser des données sans possibilité de les modifier et de les enregistrer :

- Démarrez SICAT Suite avec une radiographie 3D depuis Sirona SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Démarrer SICAT Suite* [► Page 43 - SIDEXIS 4].
- ▶ SICAT Suite ouvre la radiographie 3D et les projets de planification à partir de l'examen SIDEXIS 4 actuel.
- ▶ Si rien ne s'y oppose, SICAT Function prend en charge l'orientation du volume et la courbe panoramique de SIDEXIS 4. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 100 - SIDEXIS 4].



Les conditions suivantes doivent être remplies afin que vous puissiez adapter l'orientation du volume et la courbe panoramique:

- Vous avez activé une licence avec laquelle vous pouvez ouvrir des radiographies 3D ou des études SICAT Function Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [▶ *Page 48 - SIDEXIS 4*].
- Il existe des objets dans aucune étude afférente SICAT Function en mode de lecture seule pour la radiographie 3D ou d'une autre application SICAT qui seraient concernés par une modification de l'orientation du volume ou de la courbe panoramique.

Si les conditions ne sont pas remplies, SICAT Function désactive dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** les boutons et éléments de contrôle que vous pourriez utiliser à des fins de modification de l'orientation du volume ou de la courbe panoramique.

37 *FERMER SICAT SUITE*



- Cliquez sur le bouton **Fermer** dans le coin supérieur gauche de l'étude actuellement ouverte.
- ▶ SICAT Suite se ferme.
- ▶ SICAT Suite enregistre dans SIDEXIS 4 les projets de planification modifiés de toutes les applications SICAT qui s'exécutent en tant que version complète.

38 RACCOURCIS CLAVIER



Lorsque vous amenez le pointeur de la souris sur certaines fonctions, SICAT Function affiche le raccourci clavier entre parenthèses à côté de la désignation de la fonction.

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans toutes les applications SICAT :

RACCOURCIS CLAVIER	DESCRIPTION
A	Ajouter une mesure d'angle
D	Ajouter une mesure de distance
F	Focaliser l'objet actif
Ctrl + C	Copier le contenu de la vue active dans le presse-papiers
Ctrl + Z	Annuler la dernière dernière manipulation d'un objet
Ctrl + Y	Répéter la dernière manipulation annulée d'un objet
Suppr	Supprimer l'objet actif ou le groupe actif
Échap	Annuler l'action actuelle (par ex. l'ajout d'une mesure)
F1	Ouvrir la fenêtre Assistance , ouvrir les instructions de service lorsque l'application SICAT est activée

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans la fenêtre **Segmentation de la mandibule** de SICAT Function :

RACCOURCIS CLAVIER	DESCRIPTION
N	Navigation
M	Segmenter la mandibule
F	Segmenter les fosses
B	Segmenter l'arrière-plan

39 DÉSINSTALLER SICAT SUITE



Le programme de désinstallation de SICAT Suite conserve toutes les licences actives sur votre ordinateur. C'est pourquoi le programme d'installation de SICAT Suite vous avertit avant la désinstallation qu'il ne supprime pas automatiquement les licences. Si vous ne souhaitez plus utiliser SICAT Suite sur cet ordinateur, désactivez les licences avant la désinstallation. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 55 - SIDEXIS 4].



Avant de désinstaller SICAT Suite, assurez-vous que SICAT WebConnector a bien téléchargé toutes les commandes, car le programme de désinstallation ferme automatiquement SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *SICAT WebConnector* [► Page 174 - SIDEXIS 4].

Procédez de la manière suivante pour désinstaller SICAT Suite :

SICAT WebConnector a téléchargé toutes les commandes avec succès

1. Dans le **Panneau de configuration** de Windows, cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.

► La fenêtre **Programmes et fonctionnalités** s'ouvre.

2. Sélectionnez dans la liste l'entrée **SICAT Suite**, celle-ci contenant en outre la version de SICAT Suite.

3. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.

► Le programme de désinstallation démarre et la fenêtre **PROGRESSION** s'ouvre :



- Une fois la désinstallation terminée, la fenêtre **CONFIRMATION** s'ouvre :



4. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

- Le programme de désinstallation de SICAT Suite se ferme.



Pour ouvrir le programme de désinstallation de SICAT Suite, vous pouvez également lancer le programme d'installation sur un ordinateur sur lequel SICAT Suite est déjà installé.



Le programme de désinstallation de SICAT Suite appelle le programme de désinstallation de certains logiciels requis qui ont été installés avec SICAT Suite. Si d'autres applications installées ont besoin de ces logiciels, ils ne sont pas supprimés.

40 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RADIOGRAPHIES 3D



ATTENTION

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



ATTENTION

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Des appareils de radiographie non conformes à DICOM peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que des radiographies 3D d'appareils de radiographie munis d'une déclaration de conformité DICOM.

CONDITIONS DE VISUALISATION



ATTENTION

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.



ATTENTION

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

GESTION DES DONNÉES



ATTENTION

Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.



ATTENTION

La suppression des données originales peut entraîner une perte de données.

Ne supprimez pas les données originales après l'importation.



L'absence d'un procédé de sauvegarde des données des dépôts de dossiers patient peut entraîner la perte irrémédiable de données patient.

Assurez-vous qu'une sauvegarde périodique des données de tous les dépôts de dossiers patient est réalisée.



Lorsque vous supprimez des dossiers patient, toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification qui y sont contenus sont également supprimés.

Ne supprimez des dossiers patient que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des radiographies 3D, des projets de planification et des fichiers PDF qu'ils contiennent.



Les dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Ne supprimez des dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin de ces données.



Lorsque vous supprimez des radiographies 3D, tous les projets de planification qui en dépendent sont également supprimés.

Ne supprimez des radiographies 3D que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des projets de planification qui en dépendent.

RÉSEAU



L'enregistrement de données d'application SICAT dans un système de fichiers réseau non fiable peut entraîner la perte de données.

Assurez-vous, en coopération avec votre administrateur réseau, que les données d'application SICAT puissent être enregistrées en toute sécurité dans le système de fichiers réseau souhaité.



L'utilisation commune de SICAT Suite et des applications SICAT intégrées avec d'autres appareils d'un réseau d'ordinateurs ou d'un réseau de stockage peut entraîner des risques jusqu'alors inconnus pour les patients, les utilisateurs et d'autres personnes.

Assurez-vous que des règles soient établies au sein de votre établissement afin de déterminer, d'analyser et d'évaluer les risques liés à votre réseau.



Des risques nouveaux peuvent résulter de modifications de votre environnement réseau telles que des modifications de votre configuration réseau, la connexion d'appareils ou de composants supplémentaires à votre réseau, la déconnexion d'appareils ou de composants du réseau, ainsi que la mise à jour ou la mise à niveau d'appareils ou de composants du réseau.

Effectuez une nouvelle analyse des risques du réseau après chaque modification du réseau.

QUALIFICATION DES OPÉRATEURS



L'utilisation de ce logiciel par du personnel non qualifié peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

Seul des opérateurs qualifiés sont autorisés à utiliser ce logiciel.

SÉCURITÉ



Des failles de sécurité dans votre système informatique peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

1. Assurez-vous que votre établissement a adopté des directives permettant de détecter et d'éviter toute menace à la sécurité de votre environnement informatique.
2. Installez un antivirus à jour et exécutez-le.
3. Assurez-vous que les fichiers de définition de l'antivirus soient régulièrement mis à jour.



Un accès non autorisé à votre station de travail peut entraîner un risque pour la confidentialité et l'intégrité de vos données patient.

Limitez l'accès à votre station de travail aux personnes autorisées.



Des problèmes de cybersécurité peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

Si vous supposez l'existence de problèmes de cybersécurité de votre application SICAT, prenez immédiatement contact avec l'assistance.

INSTALLATION LOGICIELLE



En cas de modification du logiciel, celui-ci risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Ne procédez à aucune modification de l'installation du logiciel.
2. Ne supprimez et ne modifiez aucun composant compris dans le répertoire d'installation du logiciel.



Des supports d'installation endommagés peuvent entraîner l'échec de l'installation.

Manipulez les supports d'installation avec soin et entreposez-les de manière appropriée.



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.



Des autorisations insuffisantes peuvent entraîner l'échec de l'installation ou de la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous de disposer d'autorisations suffisantes sur votre système lorsque vous installez ou mettez à jour le logiciel.

COMMANDES



Des données de commande incorrectes peuvent entraîner une commande erronée.

Lorsque vous procédez à une commande, assurez-vous que vous sélectionnez et transmettez les données correctes pour cette commande.



Une commande erronée peut entraîner un traitement erroné.

1. Vérifiez votre commande avant de l'envoyer.
2. Confirmez la planification correcte de votre commande.

DONNÉES DE MOUVEMENT



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données de mouvement de la mâchoire d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination n'est pas appropriée peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination est conforme à l'utilisation des données de mouvement de la mâchoire par SICAT Function.



L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire non pris en charge ou d'appareils d'enregistrement non compatibles peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des données de mouvement de la mâchoire qui ont été acquises avec une combinaison supportée d'un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire (par exemple SICAT JMT*) et d'un appareil de recalage compatible (par exemple SICAT Fusion Bite).



ATTENTION

Une acquisition incorrecte des données de mouvement de la mâchoire et des radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que les données de mouvement de la mâchoire et les radiographies 3D ont été acquises conformément aux instructions des fabricants des appareils. Utilisez le type de corps de référence indiqué.



ATTENTION

Des données de mouvement de la mâchoire qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données de mouvement de la mâchoire correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données de mouvement de la mâchoire peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données de mouvement de la mâchoire importées.



ATTENTION

Une qualité, une précision et une résolution insuffisantes des données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données de mouvement de la mâchoire présentant une qualité, une résolution et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou une qualité insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec du mécanisme de détection des marqueurs et du corps de référence. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant la détection correcte des marqueurs et du corps de référence.



ATTENTION

Une position, un type et une orientation incorrects du corps de référence peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Après la détection du corps de référence par l'assistant JTM, contrôlez la position, le type et l'orientation corrects du corps de référence en tenant compte des radiographies 3D.



ATTENTION

Un recalage incorrect des données de mouvement de la mâchoire sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données de mouvement de la mâchoire recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

EMPREINTES OPTIQUES



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.



Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou des points manquants pour le recalage peuvent entraîner l'échec de la procédure de recalage d'empreintes optiques. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des empreintes optiques et des radiographies 3D permettant un recalage précis.



La sélection, dans le procédé de recalage d'empreintes optiques, de marquages qui ne coïncident pas peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Lorsque vous recalagez des données d'empreintes optiques, sélectionnez soigneusement, dans les radiographies 3D et dans les empreintes optiques, des marquages qui coïncident.



ATTENTION

Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

SEGMENTATION



ATTENTION

Des artefacts excessifs ou une résolution insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec de la procédure de segmentation ou des résultats insuffisants. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant une qualité suffisante de la segmentation des structures anatomiques concernées.



ATTENTION

Une qualité insuffisante de la segmentation peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez que la qualité de la segmentation est suffisante pour l'utilisation prévue.

41 PRÉCISION

Le tableau suivant indique les valeurs de précision dans toutes les applications SICAT :

Précision des mesures de distances	< 100 µm
Précision des mesures d'angles	< 1 degré
Précision de la représentation	< 20 µm
Précision de la représentation pour les données de mouvement de la mâchoire	< 0,6 mm

GLOSSAIRE

ADA

American Dental Association (association dentaire américaine)

Application

Les applications SICAT sont des programmes qui font partie de SICAT Suite.

Cadres

Dans la vue 3D, des cadres indiquent les positions des vues de coupes 2D.

Empreintes optiques

Une empreinte optique est le résultat d'une acquisition 3D de la surface de dents, de matériaux d'empreinte ou de modèles en plâtre.

Étude

Une étude se compose d'une radiographie 3D et du projet de planification correspondant.

FDI

Fédération Dentaire Internationale

Fenêtre de notification

La fenêtre de notification affiche sur le bord inférieur droit de l'écran des messages relatifs aux procédures terminées.

Fourchette occlusale

Une fourchette occlusale est une plaque à mordre munie de marqueurs radio-opaques sphériques, utilisée par SICAT pour fusionner les données de radiographies 3D avec les données de mouvement de la mâchoire.

Recalage

Orientation spatiale

Réticules

Les réticules sont des lignes d'intersection avec d'autres vues de coupes.

SICAT JMT+

SICAT JMT+ enregistre les mouvements de la mandibule.

SICAT Portal

SICAT Portal est un site Internet sur lequel vous avez la possibilité, entre autres, de commander des gouttières chez SICAT.

SIXD

Format de fichier pour l'échange d'empreintes optiques.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (Société des ingénieurs du cinéma et de la télévision)

SSI

Format de fichier pour l'échange d'empreintes optiques.

STL

Surface Tessellation Language, format de fichier standard pour l'échange de données de maillage, pouvant être contenues dans les empreintes optiques, par exemple.

INDEX

A

Aperçu général de SICAT Suite	17
Articulation anatomique	134
Assistance	189
Informations de contact	191
Informations produit	192
Outils	191
Ouverture de la fenêtre d'assistance	190
Ouvrir l'aide	47

B

Barre d'outils de flux de travail	59
-----------------------------------	----

C

Calibrage du moniteur	183
Captures d'écran	
Créer des espaces de travail	75
Captures d'écrans	
Créer des vues	89
CEREC	
Valeurs d'articulateur	147
Commande	163
Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier	166
Chargement automatique après le redémarrage	175
Contrôler le panier	171
Définir la position thérapeutique	164
Écraser la position thérapeutique	165
Interrompre et poursuivre le chargement	175
SICAT Portal	173
Supprimer la position thérapeutique	164
Transfert de données en arrière-plan	172
Transmission de données par un autre ordinateur	176
Commuter	
Applications	46
Commuter entre les applications	46
Configuration système requise	10

D

Désinstallation	197
Données de mouvement	111
Appareils	112
Exporter	137
Importer et enregistrer	114
Sélectionner les relations intermaxillaires statiques ou les mouvements de la mâchoire.	136
Visionner les tracés de mouvements anatomiques	135

E

Empreintes optiques	124
Importation STL	131
Importer et enregistrer	126
Réutiliser à partir d'autres applications SICAT	132
Enregistrer le module	
SIDEXIS 4	39
Espace de travail TMJ	71
Afficher la limite de la segmentation	145
Afficher le mouvement axé sur les condyles	146
Déplacer les points de tracé	142
Fonctions	141
Informations générales	70
Placer le point inter-incisif	143
Utilisation du triangle de Bonwill	144
Valeurs d'articulateur	147
Espaces de travail	67
Adapter	74
Ajouter des captures d'écran à l'édition SIDEXIS 4	75
Barre d'outils de l'espace de travail	58
Changer	73
Créer des captures d'écran	75
MPR/Radiologie	72
Panorama	69
Réinitialiser	74
TMJ	70
Étape de flux de travail	
Commander	60
Diagnostiquer	60
Préparer	59
Études SICAT Fonction	
Dans SIDEXIS 4	42
Exportation de données	162

F

Fenêtre d'examen	68
Fermer	195
Flux de travail	36

I

Importation STL	131
Informations relatives à la sécurité	12
Niveaux de danger	13
Qualification des opérateurs	14
Installation	19
Désinstallation	197
Interface utilisateur	
SICAT Fonction	58
SICAT Suite	45

L

Langues	17
Licences	48
Activation automatique	51
Activation manuelle	53
Afficher	50
Restituer au pool de licence	55
Utiliser des codes de bon d'échange	57

M

Mesures	
Ajouter des mesures d'angles	158
Ajouter des mesures de distances	157
Déplacer	160
Déplacer des points de mesure	160
Déplacer des valeurs de mesure	161
Vue d'ensemble	156
Mire SMPTE	183

N

Notice d'instruction	
Ouvrir comme aide en ligne	47
Symboles et styles	15
Vue d'ensemble	16

O

Objets	
Activer les objets et les groupes d'objets	62
Annuler et répéter	64
Barre d'objets	61
Barre d'outils d'objet	64
Focalisation	64
Masquer et afficher les objets et les groupes d'objets	63
Objets de SICAT Function	65
Réduire et développer les groupes d'objets	62
Supprimer	64
Orientation du volume	100
Adapter	103
Ouvrir les données en mode de lecture seule	193

P

Panier d'achat	
Ouvrir	170
Particularités de cette version	32
Premières étapes	36

R

Raccourcis clavier	196
Réglages	180
Modifier les réglages de visualisation	186
Modifier ou visualiser les réglages généraux	181

Visionner ou modifier les informations du cabinet	185
---	-----

Visionner ou modifier les réglages de SICAT Function	188
--	-----

S

Segmentation	118
Segmenter la mandibule	119
Segmenter les fosses	121
Segmenter la mandibule	119
Segmenter les fosses	121
SICAT Function	
Interface utilisateur	58
SICAT Portal	173
SICAT Suite	
Démarrer	43
Fermer	195
Interface utilisateur	45
SICAT WebConnector	174
SIDEXIS 4	
Ajouter des captures d'écran de vues	89
Ajouter des captures d'écran d'espaces de travail	75
Barre de phases	40
Enregistrer le module	39
Études SICAT Function	42
Timeline	44

T

Tracés	134
Adapter avec la fenêtre d'examen	139
Adapter avec le réticule	140
Représenter dans la vue 3D	138

U

Utilisation conforme	8
Utiliser des codes de bon d'échange	57

V

Valeurs d'articulateur	
Informations générales	147
Relevé avec des condyles invisibles	153
Relevé avec des condyles visibles	151
Versions	
Différences	32
Vue 3D	90
Commuter le type de représentation	95
Configurer	96
Déplacer l'extrait	98
Modifier le sens de vision	91
Types de représentation	93
Vues	76
Barre d'outils de vue	77
Commuter	79
Contraste et luminosité	81

Créer des captures d'écran	89
Déplacer des extraits	83
Déplacer la fenêtre d'examen	86
Faire défiler	84
Masquer et afficher la fenêtre d'examen	87
Maximiser et restaurer	80
Réinitialiser	88
Réticules et cadres	85
Zoomer	83

Z

Zone JMT	135
Gérer les signets	137
Zone panoramique	101
Adapter	108



SICAT FUNCTION *VERSION 1.4*

Notice d'instruction | Français | SIDEXIS XG

TABLE DES MATIÈRES - SIDEXIS XG

1	Utilisation conforme	6
2	Historique des versions	7
3	Configuration système requise	8
4	Informations relatives à la sécurité	10
4.1	Définition des niveaux de danger	11
4.2	Qualification des opérateurs	12
5	Symboles et mises en relief utilisés	13
6	Vue d'ensemble de la notice d'instruction	14
7	Aperçu général de SICAT Suite	15
8	Installer SICAT Suite	17
9	Effectuez les étapes d'essai après la mise à jour du système d'exploitation	23
10	Actualiser ou réparer SICAT Suite	29
11	Particularités dans cette version	30
12	Flux de travail standard de SICAT Function	32
13	Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG	36
14	Démarrer SICAT Suite	38
15	Interface utilisateur de SICAT Suite	39
16	Commuter entre les applications SICAT	41
17	Ouvrir les instructions de service	42
18	Licences	43
18.1	Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"	45
18.2	Activer des licences via une connexion Internet active	46
18.3	Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active	48
18.4	Restituer des licences au pool de licences	50
18.5	Utiliser des codes de bon d'échange	51
19	Interface utilisateur de SICAT Function	52
19.1	Barre d'outils de flux de travail	53
19.2	Barre d'objets	55
19.3	Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets	56
19.4	Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet	58
19.5	Objets de SICAT Function	59
20	Espaces de travail	61
20.1	Vue d'ensemble de l'espace de travail Panorama	62
20.2	Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ	64
20.3	Vue d'ensemble de l'espace de travail MPR/Radiologie	66

20.4	Changer d'espace de travail actif.....	67
20.5	Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail	68
20.6	Créer des captures d'écran d'espaces de travail.....	69
21	Vues	70
21.1	Adaptation des vues	71
21.2	Changer de vue active.....	73
21.3	Maximiser et restaurer les vues	74
21.4	Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D.....	75
21.5	Zoomer les vues et déplacer des extraits	77
21.6	Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D.....	78
21.7	Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres.....	79
21.8	Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen	80
21.9	Réinitialiser les vues	82
21.10	Créer des captures d'écran de vues	83
22	Adaptation de la vue 3D	84
22.1	Modifier le sens de vision de la vue 3D.....	85
22.2	Types de représentation de la vue 3D.....	86
22.3	Commuter le type de représentation de la vue 3D.....	89
22.4	Configurer le type de représentation actif de la vue 3D.....	90
22.5	Déplacer l'extrait.....	92
23	Orientation du volume et zone panoramique	94
23.1	Adapter l'orientation du volume.....	96
23.2	Adapter la zone panoramique.....	101
24	Données de mouvement.....	104
24.1	Appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles	105
24.2	Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés.....	106
25	Segmentation	111
25.1	Segmenter la mandibule	112
25.2	Segmenter les fosses	114
26	Empreintes optiques.....	117
26.1	Importer et recalcr les empreintes optiques.....	118
26.2	Étapes supplémentaires pour les empreintes optiques en format STL.....	124
26.3	Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT.....	125
27	Articulation anatomique	127
27.1	Interagir avec les mouvements de la mâchoire	128
27.2	Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D.....	131
27.3	Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen.....	132
27.4	Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule.....	133
28	Fonctions de l'espace de travail TMJ	134
28.1	Déplacer les points de tracé	135

28.2	Placer le point inter-incisif.....	136
28.3	Utilisation du triangle de Bonwill.....	137
28.4	Afficher la limite de la segmentation	138
28.5	Afficher le mouvement axé sur les condyles	139
29	Valeurs d'articulateur	140
29.1	Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles visibles	144
29.2	Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles invisibles	146
30	Mesures de distances et d'angles	149
30.1	Ajouter des mesures de distances.....	150
30.2	Ajouter des mesures d'angles	151
30.3	Déplacer des mesures, des points de mesure et des valeurs de mesure	153
31	Exportation de données	155
31.1	Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"	156
31.2	Exporter des données	157
32	Processus de commande	159
32.1	Définir une position thérapeutique.....	160
32.2	Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier	162
32.3	Ouvrir le panier	166
32.4	Contrôler le panier et terminer la commande.....	167
32.5	Terminer une commande via une connexion Internet active	168
32.6	Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal.....	169
32.7	SICAT WebConnector	170
32.8	Terminer une commande sans connexion Internet active	172
33	Réglages	176
33.1	Utiliser les réglages généraux.....	177
33.2	Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE.....	179
33.3	Utiliser les informations sur le cabinet	181
33.4	Modifier les réglages de visualisation	182
33.5	Modifier les réglages de SICAT Function.....	184
34	Assistance	185
34.1	Ouvrir les possibilités d'assistance	186
34.2	Informations de contact et outils d'assistance	187
34.3	Info.....	188
35	Ouvrir les données en mode de lecture seule.....	189
36	Fermer SICAT Suite	191
37	Raccourcis clavier.....	192
38	Désinstaller SICAT Suite	193
39	Consignes de sécurité	195
40	Précision.....	202

Glossaire	203
Index	204

1 UTILISATION CONFORME

SICAT Function est un logiciel de visualisation et de segmentation d'informations d'images de la zone oro-maxillo-faciale et de représentation des mouvements de la mâchoire.

Les informations d'images sont issues de scanners médicaux (scanners CT ou DVT, p. ex.) et de systèmes de prise d'empreintes optiques. Les informations de mouvement proviennent p. ex. d'appareils de condylographie.

SICAT Function assiste le chirurgien-dentiste qualifié lors de l'examen, du diagnostic et de la préparation de la thérapie dans le domaine maxillo-facial ainsi que lors de la planification du traitement thérapeutique de difficultés affectant l'appareil masticatoire.

Les données de planification peuvent être extraites de SICAT Function pour être utilisées pour la réalisation de la thérapie.

2 HISTORIQUE DES VERSIONS

VERSION 1.4

- Pour des raisons réglementaires, les applications SICAT nécessitent une licence également pour le mode viewer. Des applications sans une licence ne sont pas disponibles. SICAT ajoute automatiquement à votre code d'activation client des licences viewer d'applications qui sont autorisées dans votre pays. Vous pouvez activer les licences viewer en désactivant puis réactivant n'importe quelle licence. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 43 - *SIDEXIS XG*].
- Les instructions de service sont également disponibles dans la version standalone et dans plug-in SIDEXIS XG sous la forme de fichiers PDF.
- SICAT Function un axe virtuel peut être calculé à l'aide de données de mouvement de la mâchoire.
- SICAT Function indique les longueurs du côté du triangle de Bonwill.

VERSION 1.3

- Module SIDEXIS 4
- Prise en charge des langues italienne, espagnole, portugaise, néerlandaise et russe
- Le numéro de version de SICAT Function correspond maintenant au numéro de version de SICAT Suite.
- Commande de gouttières thérapeutiques également possible via la fabrication d'un modèle en plâtre.
- **TMJ**Espace de travail visualisant les mouvements des condyles segmentés.
- La segmentation peut être traitée après fermeture de la fenêtre de segmentation.


VERSION 1.1

- Prise en charge des langues française et japonaise
- Correction de l'orientation du volume
- Commande de gouttières thérapeutiques OPTIMOTION
- Modification du format des données de mouvement de la mâchoire en fichiers .jmt
- Exportation des empreintes optiques avec tracés des mouvements intégrés

VERSION 1.0

- Version initiale
- Prise en charge des langues anglaise et allemande

3 CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE



ATTENTION

Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.

Processeur	Quad Core 2,3 GHz
Mémoire de travail	8 Go
Carte graphique	Dédiée* DirectX 11 ou version supérieure Mémoire graphique 2 Go Pilote actuel avec prise en charge de WDDM 1.0 au minimum
Écran	Résolution minimale 1 920 x 1 080 pixels avec un niveau de mise à l'échelle de 100 à 125 pour cent** Résolution maximale 3 840 x 2 160 pixels avec un niveau de mise à l'échelle de 100 à 200 pour cent**
Espace libre sur le disque dur	20 Go et un espace supplémentaire pour les jeux de données
Supports de stockage	Accès au support de stockage externe contenant les fichiers d'installation.
Périphériques d'entrée	Clavier, souris
Réseau	Ethernet, 100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s recommandé
Imprimante pour l'information du patient	Minimum 300 dpi Format de papier DIN A4 ou lettre US
Système d'exploitation	Windows 7 SP1 (64 bits) avec KB2670838 Windows 8 (64 bits, Desktop) Windows 8.1 (64 bits, Desktop) Windows 10 (64 bits, Desktop)
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer 11 ou version supérieure Mozilla Firefox 39 ou version supérieure Google Chrome 44 ou version supérieure JavaScript doit être activé. Un navigateur standard doit être réglé.

Viewer PDF	Par exemple Adobe Reader DC ou version supérieure
SIDEXIS XG avec SICAT Suite en tant que plug-in	Version 2.6.1 (64 bits)
SIDEXIS 4 avec SICAT Suite en tant que module	Version 4.2 SiPlanAPI V4
SIDEXIS 4 avec SICAT Suite en tant que plug-in	Version 4.1.2 (64 bits)



*SICAT Suite ne prend en charge que des cartes graphiques dédiées à partir du niveau de performance de NVIDIA GeForce 960 GTX. Les cartes graphiques intégrées ne sont pas prises en charge.

**La combinaison entre une résolution d'écran faible et un niveau de mise à l'échelle élevé peut entraîner une visualisation incomplète de certaines parties de l'interface utilisateur par le logiciel.

L'écran doit être réglé de manière à afficher correctement la mire SMPTE. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE* [► Page 179 - SIDEXIS XG].

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

SICAT Suite requiert les composants logiciels suivants et les installe au cas où ils ne le seraient pas encore :

- Microsoft .NET Framework 4.5
- Logiciel de gestion de licence CodeMeter 6.30d
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

Le SICAT WebConnector nécessite des ports déterminés pour la communication avec le serveur SICAT. Les ports doivent être validés dans votre pare-feu :

PROTOCOLE	SENS DE LA CONNEXION	PORT
HTTP	Sortant	80
HTTPS	Sortant	443
FTPS - Gestion	Sortant	21
FTPS - Transmission de données	Sortant	49152-65534



Vous pouvez aussi commander sans le SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [► Page 159 - SIDEXIS XG].

4 *INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ*

Il est essentiel que vous lisiez les chapitres suivants relatifs à la sécurité :

- *Définition des niveaux de danger* [▶ Page 11 - SIDEXIS XG]
- *Qualification des opérateurs* [▶ Page 12 - SIDEXIS XG]
- *Consignes de sécurité* [▶ Page 195 - SIDEXIS XG]

4.1 DÉFINITION DES NIVEAUX DE DANGER

La présente notice d'instruction fait appel aux marquages de sécurité suivants pour éviter les blessures aux opérateurs et aux patients ainsi que les dommages matériels :

**ATTENTION**

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures légères si rien n'est fait pour l'éviter.

REMARQUE

Indique des informations importantes qui ne conditionnent toutefois pas la sécurité.

4.2 QUALIFICATION DES OPÉRATEURS



L'utilisation de ce logiciel par du personnel non qualifié peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

Seul des opérateurs qualifiés sont autorisés à utiliser ce logiciel.

Seul un personnel disposant d'une qualification ou d'une formation appropriée est autorisé à utiliser le logiciel.

Si vous effectuez une formation ou si vous utilisez ce logiciel dans le cadre d'une formation générale, vous ne devez utiliser ce logiciel que sous la supervision permanente d'une personne qualifiée.

Vous devez remplir les conditions suivantes pour utiliser le logiciel :

- Vous avez lu la notice d'instruction.
- Vous êtes familiarisé(e) avec la structure de base et les fonctions du logiciel.
- Vous êtes en mesure de reconnaître des dysfonctionnements du logiciel et de prendre les mesures appropriées en cas de besoin.

5 SYMBOLES ET MISES EN RELIEF UTILISÉS

SYMBOLES

Cette notice d'instruction utilise le symbole suivant :



Le symbole d'information indique des informations supplémentaires, telles que des méthodes alternatives.

MISES EN RELIEF

Les textes et les désignations d'éléments qui sont visualisés par SICAT Suite sont mis en relief en caractères **gras**. Il s'agit des objets suivants de l'interface utilisateur :

- Désignations de zones
- Désignations de boutons
- Désignations d'icônes
- Textes d'indications et de messages apparaissant à l'écran

TÂCHES À RÉALISER

Les tâches à réaliser sont décrites sous forme de listes numérotées :

- ☑ Les conditions préalables sont identifiées par ce symbole.
- 1. Les étapes sont identifiées par des numéros.
 - ▶ Les résultats intermédiaires sont identifiés par ce symbole et mis en retrait.
- 2. Ils sont suivis d'autres étapes.
 - ▶ Les résultats finals sont identifiés par ce symbole.
 - Une instruction qui se compose d'une seule étape est identifiée par ce symbole.

6 VUE D'ENSEMBLE DE LA NOTICE D'INSTRUCTION

SICAT Function fait partie de SICAT Suite comme d'autres applications.

SICAT Suite compose l'environnement dans lequel s'exécutent les applications SICAT. L'installation des applications s'effectue par conséquent avec SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 17 - SIDEXIS XG].

À ce jour, SICAT Suite est disponible en trois variantes. Quelques-unes des étapes de commande varient selon la variante. C'est pourquoi la notice d'instruction traite les variantes séparément :

- Module SIDEXIS 4
- Plug-in SIDEXIS XG
- Version standalone

Vous n'avez pas besoin d'opter pour une variante ou une autre lors de l'installation de SICAT Suite.

La désinstallation des applications s'effectue également avec SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Désinstaller SICAT Suite* [► Page 193 - SIDEXIS XG].

7 APERÇU GÉNÉRAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite se compose des éléments suivants :

- SICAT Function - l'utilisation conforme de SICAT Function est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Function.
- SICAT Air - l'utilisation conforme de SICAT Air est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Air.
- SICAT Endo - l'utilisation conforme de SICAT Endo est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Endo.

LANGUES

L'interface utilisateur de SICAT Suite prend en charge les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- Français
- Japonais
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Portugais
- Russe

LICENCES

Les étapes suivantes sont nécessaires pour activer une application SICAT ou une fonction individuelle.

- Vous contactez votre partenaire commercial local.
- Vous obtenez un code de bon échange.
- Vous générez une clé de licence à partir du code de bon échange sur SICAT Portal (accessible par la page d'accueil SICAT).
- SICAT ajoute la clé de licence à votre clé d'activation.
- Vous activez avec votre clé d'activation des applications SICAT ou différentes fonctions sur des ordinateurs sur lesquels SICAT Suite est installée.

VERSION COMPLÈTE ET MODE VIEWER

SICAT Suite peut démarrer dans deux modes différents :

- Si vous n'avez pas activé la licence viewer d'au moins une application SICAT, SICAT Suite démarre en mode viewer.
- Si vous n'avez pas activé la licence en version complète d'au moins une application SICAT, SICAT Suite démarre en version complète.

Règles générales :

- Les applications dont la licence en version complète est activée démarrent en version complète.
- Les applications dont la licence viewer est activée démarrent en mode viewer.
- Les applications dont la licence n'est pas activée ne démarrent pas.
- Vous n'avez pas besoin d'opter pour un mode ou un autre lors de l'installation de SICAT Suite.

8 INSTALLER SICAT SUITE



En cas de modification du logiciel, celui-ci risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Ne procédez à aucune modification de l'installation du logiciel.
2. Ne supprimez et ne modifiez aucun composant compris dans le répertoire d'installation du logiciel.



Des supports d'installation endommagés peuvent entraîner l'échec de l'installation.

Manipulez les supports d'installation avec soin et entreposez-les de manière appropriée.



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.



Des autorisations insuffisantes peuvent entraîner l'échec de l'installation ou de la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous de disposer d'autorisations suffisantes sur votre système lorsque vous installez ou mettez à jour le logiciel.



La fonction **Autostart** de Windows est éventuellement désactivée sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir le support optique dans l'explorateur de fichiers de Windows et démarrer manuellement le fichier **SICATSuiteSetup.exe**, le nom du fichier contenant la version de SICAT Suite.

Procédez de la manière suivante pour installer SICAT Suite :

- Votre ordinateur remplit les exigences de configuration système requises. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Configuration système requise* [► Page 8 - SIDEXIS XG].
1. Insérez le support d'installation de SICAT Suite dans le lecteur optique de votre ordinateur.
 - La fenêtre **Autostart** s'ouvre.
 2. Dans la fenêtre **Autostart**, sélectionnez l'option **Exécuter SICATSuiteSetup.exe**, le nom du fichier contenant la version de SICAT Suite.
 - La configuration logicielle requise est installée, si elle n'est pas déjà disponible sur votre ordinateur.



- Le programme d'installation de SICAT Suite démarre et la fenêtre **INTRODUCTION** s'ouvre :



3. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre **INTRODUCTION**, sélectionnez la langue souhaitée du programme d'installation de SICAT Suite puis cliquez sur **Suivant**.

► La fenêtre **CONTRAT DE LICENCE** s'ouvre :



4. Lisez en entier le contrat de licence de l'utilisateur final, cochez la case d'option **J'accepte les conditions du contrat de licence** puis cliquez sur **Suivant**.

► La fenêtre **OPTIONS** s'ouvre :



5. Pour modifier le dossier du disque dur dans lequel le programme d'installation installe SICAT Suite, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Sélectionner un dossier** s'ouvre.
6. Naviguez jusqu'au dossier souhaité, dans lequel le programme d'installation SICAT Suite doit créer le répertoire « SICAT Suite », puis cliquez sur **OK**.
 - Le programme d'installation de SICAT Suite insère le chemin du dossier sélectionné dans le champ **Où voulez-vous installer le logiciel**.
7. Si SIDEXIS XG ou SIDEXIS 4 est installé sur votre ordinateur, la case à cocher **Je souhaite utiliser SICAT Suite avec SIDEXIS** est disponible. Vous pouvez enregistrer SICAT Suite manuellement, pendant l'installation ou ultérieurement, en tant que plug-in SIDEXIS XG ou module SIDEXIS 4.
 - Lorsque la case **Je souhaite utiliser SICAT Suite avec SIDEXIS** est cochée, la case **Créer un raccourci sur le bureau** n'est pas disponible.
8. Activez ou désactivez la case à cocher **Créer un raccourci sur le bureau**, si elle est disponible.
9. Cliquez sur le bouton **Installer**.

- La fenêtre **PROGRESSION** s'ouvre :



- SICAT Suite et la configuration logicielle restante sont installés.
- Une fois l'installation terminée, la fenêtre **CONFIRMATION** s'ouvre :



10. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

▶ Le programme d'installation de SICAT Suite se ferme.

9 EFFECTUEZ LES ÉTAPES D'ESSAI APRÈS LA MISE À JOUR DU SYSTÈME D'EXPLOITATION



En cas de modification du système d'exploitation, les applications SICAT risquent de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Avant chaque démarrage des applications SICAT, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations ou des mises à jour de sécurité depuis la dernière utilisation des applications SICAT.
2. Si le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations ou des mises à jour de sécurité, effectuez les étapes nécessaires au contrôle des applications SICAT tel que décrit dans les instructions de service.
3. Si le comportement des applications SICAT divergent du comportement décrit dans les instructions de service, n'utilisez plus le logiciel et contactez immédiatement l'assistance SICAT.

Si le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations, vous devez vous assurer que le fonctionnement de SICAT Function est parfait. Effectuez les étapes d'essai suivantes. Si vous constatez des divergences lors d'une étape d'essai, empêchez l'utilisation ultérieure de SICAT Function sur l'ordinateur concerné puis contactez l'assistance SICAT.


PRÉPARATIONS

1. Supprimer le patient « Axx Patient » afin de s'assurer qu'aucune personne non autorisée apporte des modifications.
2. Importez le jeu de données de référence depuis le fichier « SICASuite_ReferenceDataset_1.4.zip »
Le jeu de données se trouve sur le support d'installation de SICAT Suite.
3. Ouvrez le jeu de données de référence « Axx Patient » dans SICAT Function.

SEGMENTATION DE LA MÂCHOIRE INFÉRIEURE

1. Assurez-vous que l'espace de travail **Panorama** est activé.
2. Réinitialisez les vues sur des valeurs standard.
3. Assurez-vous que la vue **3D** montre la radiographie 3D de face.
4. Mettez le mode d'affichage sur **Masquer la région d'arrière-plan**.
5. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « lateral_lt.1 ».


6. Comparez la vue **3D** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation de la segmentation de la mâchoire inférieure et des empreintes optiques.

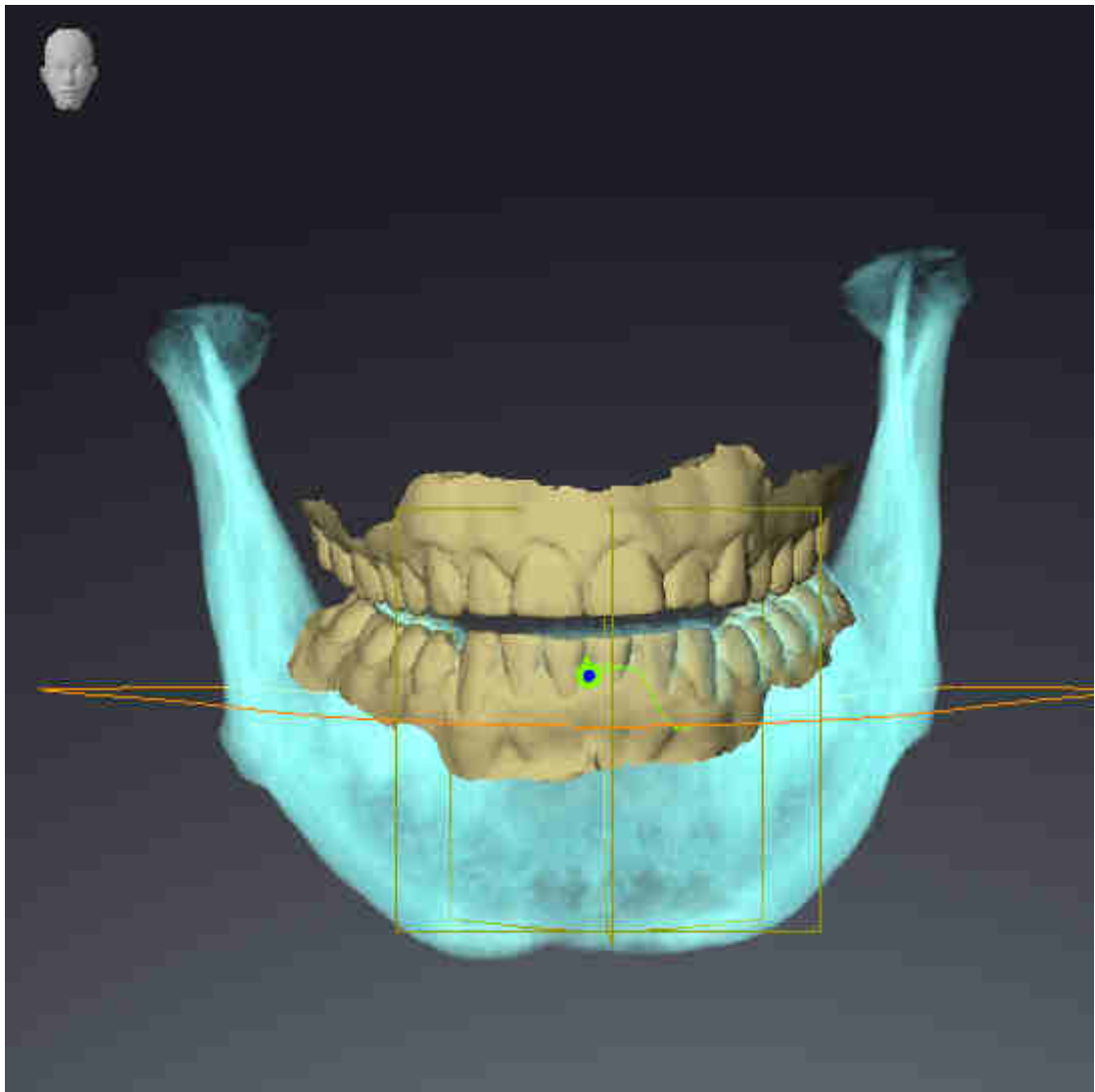


DONNÉES DE MOUVEMENT

1. Assurez-vous que l'espace de travail **TMJ** est activé.
2. Assurez-vous que les valeurs pour **Luminosité** et **Contraste** correspondent respectivement à la valeur standard de 50 %.
3. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « lateral_lt.1 ».
4. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Régions du volume** > **Mandibule** l'élément **Côté droit de la mandibule** et focalisez-le.
5. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Régions du volume** > **Mandibule** l'élément **Côté gauche de la mandibule** et focalisez-le.
6. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'élément **Régions du volume**.
7. Activez dans l'espace **Propriétés** l'option **Afficher la limite de la segmentation**.

8. Comparez la vue **Condyle droit Sagittal** avec la capture d'écran suivante.

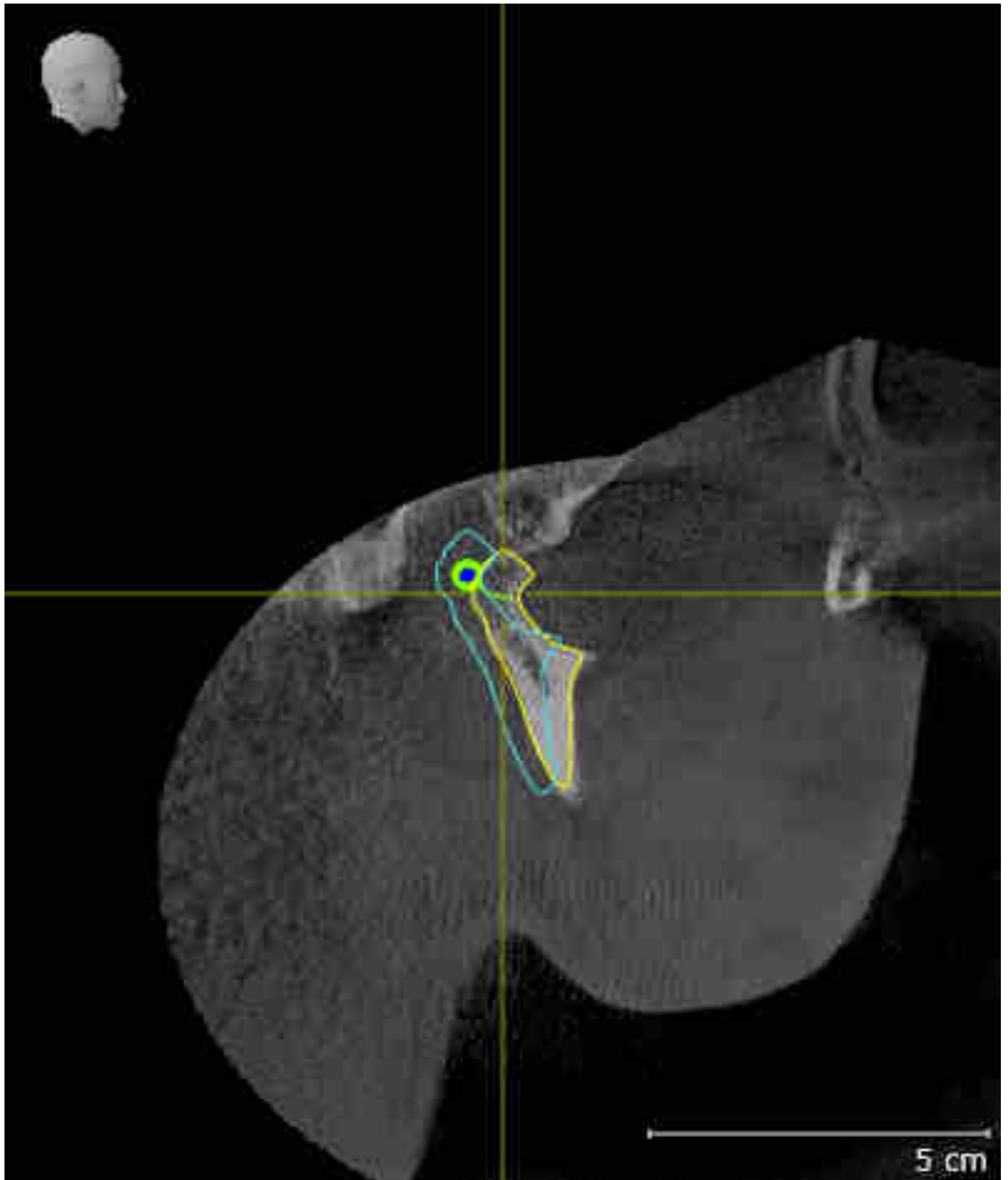


9. Comparez la vue **Condyle gauche Coronal** avec la capture d'écran suivante.

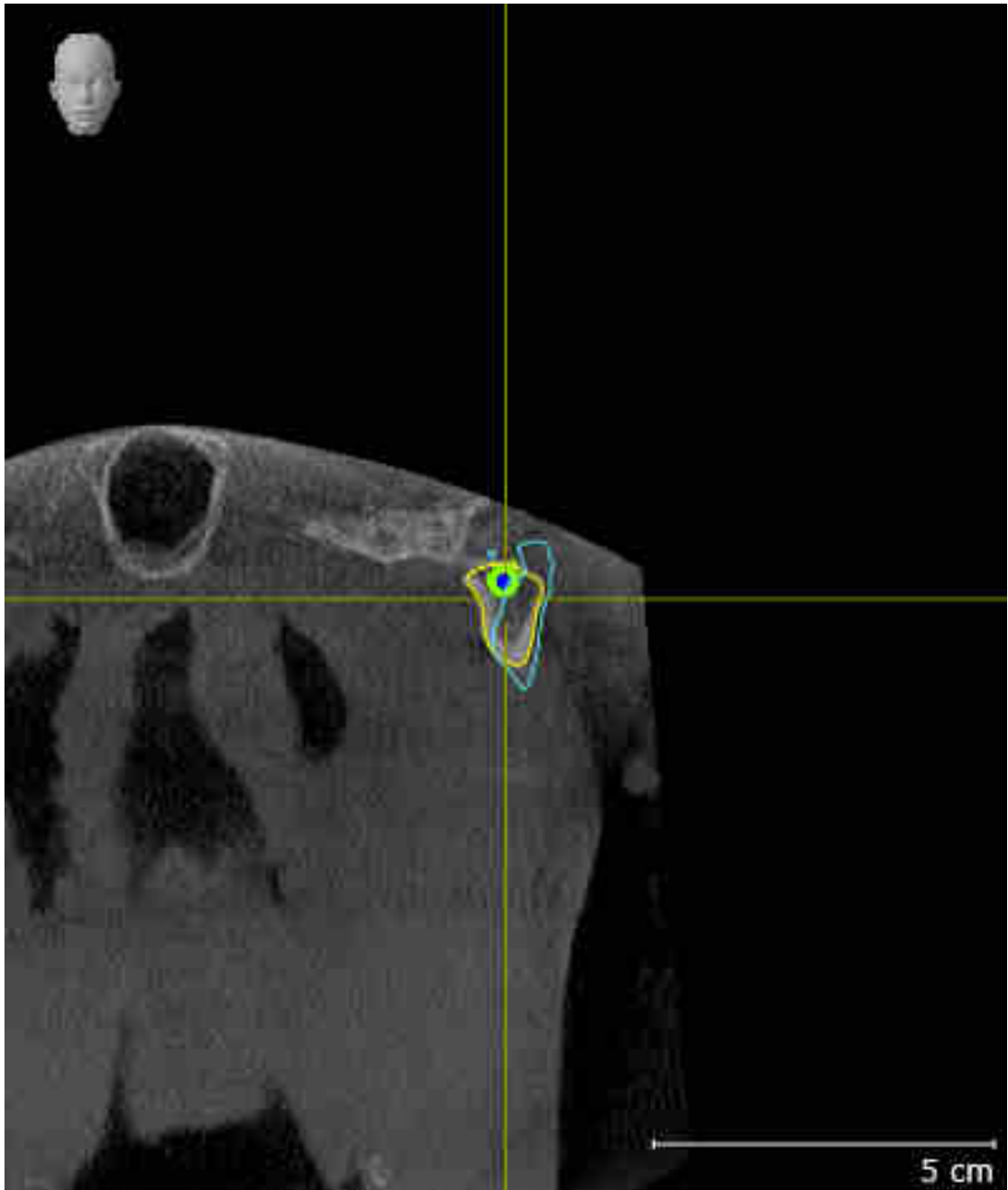

TRIANGLE DE BONWILL

1. Assurez-vous que l'espace de travail **TMJ** est activé.
2. Assurez-vous que la vue **3D** montre la radiographie 3D de face.
3. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'élément **Données de mouvement**.
4. Activez dans l'espace **Propriétés** l'option **Triangle de Bonwill**. Assurez-vous que la valeur pour **Incrément** est bien « 5 ».
5. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « chewing.1 ».


6. Mettez le mode d'affichage de la vue **3D** sur **Masquer la région d'arrière-plan**.
7. Masquez les empreintes optiques.
8. Comparez la vue **3D** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation du triangle Bonwill et des points de suivi disponibles.

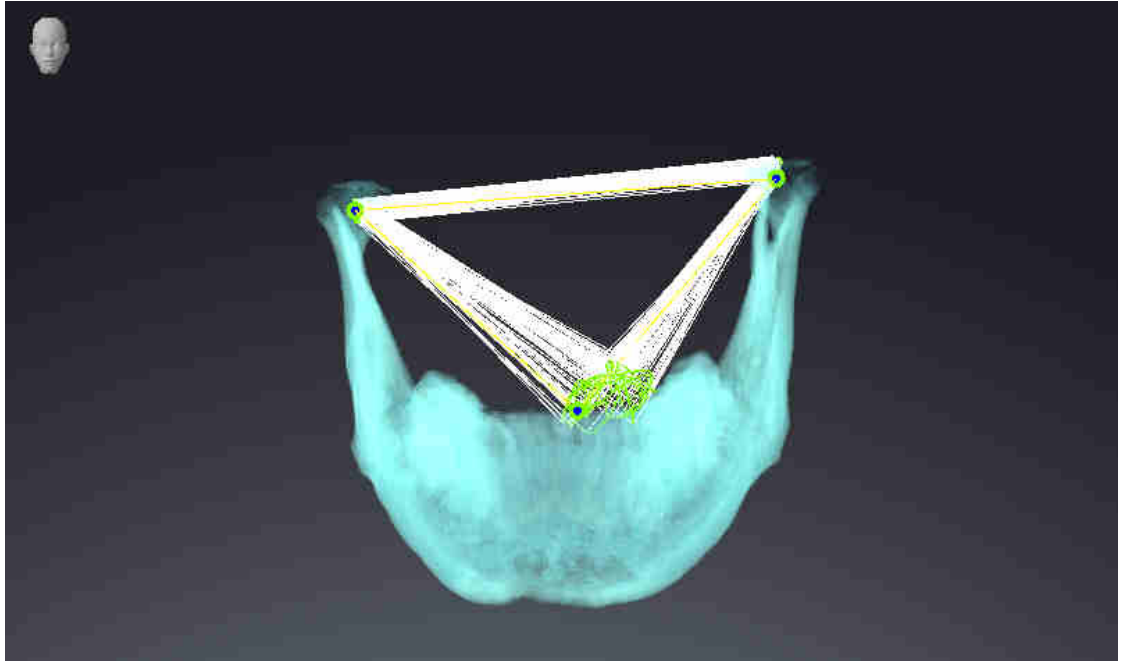

MESURES


1. Assurez-vous que l'espace de travail **MPR/Radiologie** est activé.
2. Assurez-vous que dans la vue **Axial** les valeurs pour **Luminosité** et **Contraste** correspondent respectivement à la valeur standard de 50 %.
3. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Mesures** > l'élément « 20,99 mm » et focalisez-le.

4. Comparez la vue **Axial** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation des objets de mesure (20,99 mm, 20,05 mm, 74,57 mm et 29,43°).

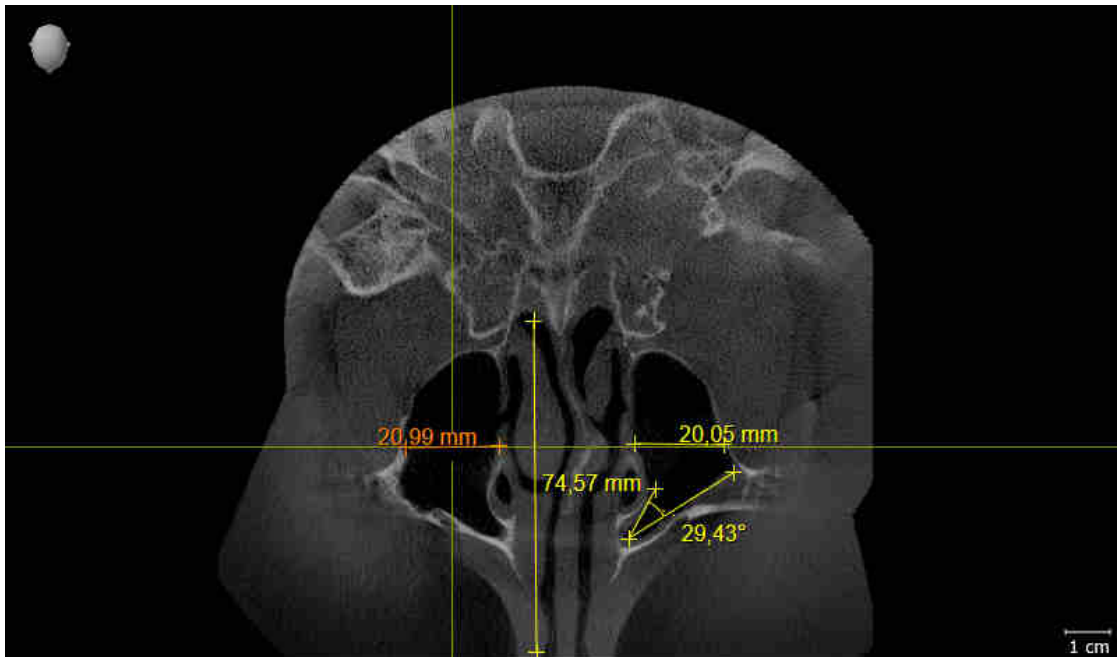

VUE PANORAMIQUE

1. Assurez-vous que l'espace de travail **Panorama** est activé.
2. Réinitialisez les vues sur des valeurs standard.
3. Comparez la vue **Panorama** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation de la vue **Panorama** et de la fenêtre d'examen.

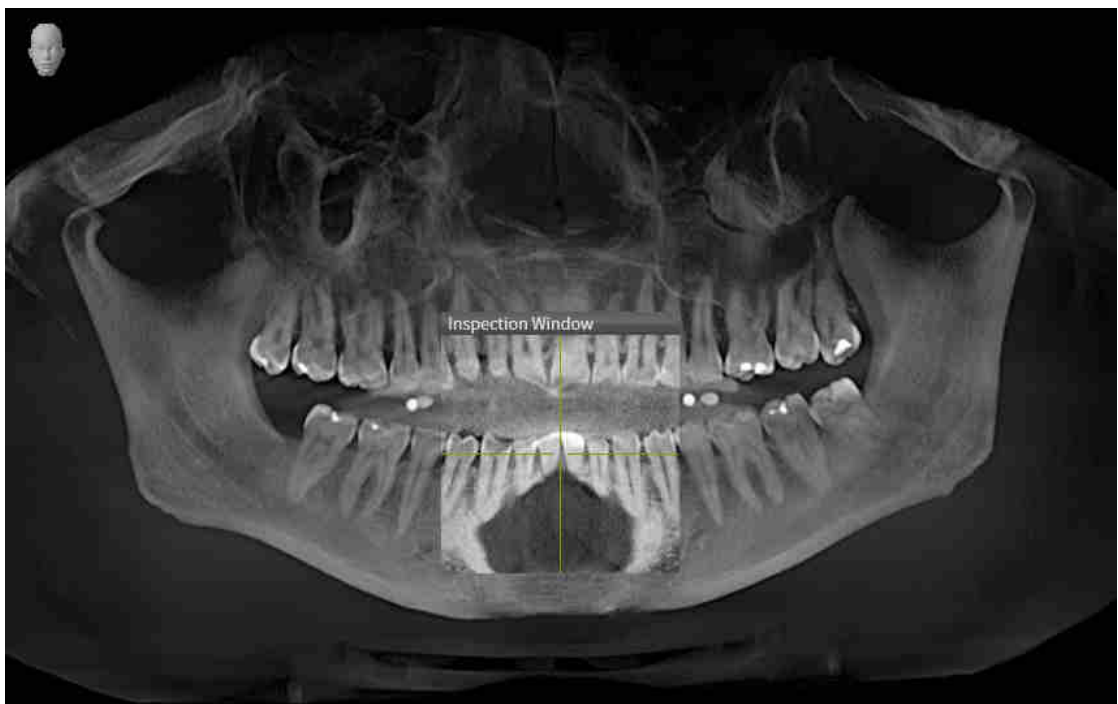

10 ACTUALISER OU RÉPARER SICAT SUITE

ACTUALISER SICAT SUITE

Vous pouvez actualiser SICAT Suite en démarrant le programme d'installation de SICAT Suite et en cliquant sur le bouton **Actualiser**. Le programme d'installation désinstalle d'abord l'ancienne version de SICAT Suite. Toutes les données et tous les réglages sont conservés.



Une nouvelle version de la version standalone de SICAT Suite a besoin de dépôts de dossiers patient actualisés. Au premier démarrage de la nouvelle version ou lorsque vous activez un dépôt de dossiers patient obsolète, SICAT Suite demande si vous voulez actualiser le dépôt de dossiers patient. Si vous confirmez le message, SICAT Suite actualise automatiquement le dépôt de dossiers patient. **ATTENTION ! Vous ne pouvez plus utiliser les dépôts de dossiers patient actualisés avec des versions antérieures de SICAT Suite.**



Lorsque vous mettez à niveau SIDEXIS XG vers SIDEXIS 4.1.3 ou vers une version supérieure puis actualisez SICAT Suite, le SICAT Suite-Installer enregistre SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4. Lorsque vous ouvrez une radiographie 3D, SICAT Suite vérifie si des études existent dans SIDEXIS XG pour cette radiographie 3D, et les reprend de SIDEXIS XG vers SIDEXIS 4.

RÉPARER SICAT SUITE

Vous pouvez réparer SICAT Suite en démarrant le programme d'installation de SICAT Suite et en cliquant sur le bouton **Réparer**. Toutes les données et tous les réglages sont conservés.

L'actualisation et la réparation de SICAT Suite utilisent toutes deux le programme d'installation de SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 17 - SIDEXIS XG].

11 PARTICULARITÉS DANS CETTE VERSION

Il existe des différences dans des espaces déterminés selon si vous utilisez SICAT Function individuellement ou raccordé à d'autres logiciels.

ENREGISTREMENT MANUEL EN TANT QUE PLUG-IN SIDEXIS XG

En plus de l'intégration automatique pendant l'installation, vous pouvez enregistrer et supprimer SICAT Suite manuellement, en tant que plug-in SIDEXIS XG. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG* [► Page 36 - SIDEXIS XG].

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

En tant que plug-in SIDEXIS XG, SICAT Suite démarre sous forme d'application externe. Le démarrage de SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG est décrit sous *Démarrer SICAT Suite* [► Page 38 - SIDEXIS XG].

DONNÉES PATIENT ET DONNÉES DE VOLUME

La version de SICAT Function liée à SIDEXIS utilise les données patient et données de volume de SIDEXIS. La sauvegarde des données s'effectue par conséquent via les procédures prévues pour SIDEXIS.



Il est recommandé de sauvegarder aussi les réglages utilisateur des applications SICAT en plus des données patient. Les réglages utilisateur sont consignés, pour chaque utilisateur séparément, dans deux répertoires. Vous pouvez ouvrir ces répertoires en entrant `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` et `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` dans la barre d'adresses de l'explorateur Windows.

RÉGLAGES

Dans la version liée à SIDEXIS, SICAT Suite affiche uniquement les valeurs de certains réglages, car il les reprend de SIDEXIS.

LICENCES

La version standalone et la version liée à d'autres logiciel de SICAT Suite utilisent les mêmes licences. Vous n'avez pas besoin d'opter pour une version ou une autre lors de l'installation de SICAT Suite.

OUVRIR DES ÉTUDES AVEC OU SANS DROITS D'ACCÈS EN ÉCRITURE



Si l'ordinateur sur lequel s'exécutent SIDEXIS XG et SICAT Suite appartient à un réseau et que SIDEXIS XG et la configuration du réseau le permettent, SIDEXIS XG peut faire partie d'une installation multi-station. Ceci peut avoir pour conséquence, entre autres, que des données ouvertes sur d'autres stations de travail ne puissent être ouvertes qu'en mode de lecture seule.

Pour vous permettre d'effectuer et d'enregistrer des modifications des études SICAT Function, il faut que les conditions suivantes soient satisfaites :

- Une licence en version complète SICAT Function doit être activée.
- La radiographie 3D à laquelle appartient l'étude SICAT Function n'est pas ouverte sur d'autres stations de travail.

Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas effectuer et enregistrer des modifications des études SICAT Function. Quand vous avez activé une licence viewer, vous pouvez visionner les radiographies 3D et les études SICAT Function.

Le tableau ci-dessous indique les fonctions qui sont disponibles selon le cas :

FONCTION	PAS DE LICENCE EN VERSION COMPLÈTE ACTIVÉE	PAS DE LICENCE VIEWER ACTIVÉE	PAS DE LICENCE ACTIVÉE
Zone assistance	Oui	Oui	Oui
Réglages généraux	Oui	Oui	Oui
SICAT Function Réglages	Oui	Oui	Non
Effectuer des modifications	Oui	Non	Non
Visualiser les données, sans enregistrer les modifications	Non	Oui	Non
Aide	Oui	Oui	Oui

Vous pouvez visionner les études SICAT Function aussi sans licence viewer dans les cas suivants :

- Exportez depuis SIDEXIS 4 des études SICAT Function et importez les données vers SIDEXIS sur un autre ordinateur. SICAT Function doit être installé sur cet ordinateur.
- Créez depuis SIDEXIS 4 un paquet Wrap&Go qui contient des études SICAT Function. Installez le paquet Wrap&Go sur un autre ordinateur. Installez ensuite SICAT Function.

Dans les deux cas, vous ne pouvez apporter ou enregistrer aucune modification sur la planification.

Dans certaines conditions, il arrive que vous ne puissiez pas effectuer ni enregistrer des modifications des études SICAT Function, même si une licence d'application est activée. Un processus de commande en cours peut en être la cause.

Autres informations disponibles sous *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [▶ Page 189 - SIDEXIS XG].

12 FLUX DE TRAVAIL STANDARD DE SICAT FUNCTION



Des failles de sécurité dans votre système informatique peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

1. Assurez-vous que votre établissement a adopté des directives permettant de détecter et d'éviter toute menace à la sécurité de votre environnement informatique.
2. Installez un antivirus à jour et exécutez-le.
3. Assurez-vous que les fichiers de définition de l'antivirus soient régulièrement mis à jour.



Un accès non autorisé à votre station de travail peut entraîner un risque pour la confidentialité et l'intégrité de vos données patient.

Limitez l'accès à votre station de travail aux personnes autorisées.



Des problèmes de cybersécurité peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

Si vous supposez l'existence de problèmes de cybersécurité de votre application SICAT, prenez immédiatement contact avec l'assistance.



L'enregistrement de données d'application SICAT dans un système de fichiers réseau non fiable peut entraîner la perte de données.

Assurez-vous, en coopération avec votre administrateur réseau, que les données d'application SICAT puissent être enregistrées en toute sécurité dans le système de fichiers réseau souhaité.



L'utilisation commune de SICAT Suite et des applications SICAT intégrées avec d'autres appareils d'un réseau d'ordinateurs ou d'un réseau de stockage peut entraîner des risques jusqu'alors inconnus pour les patients, les utilisateurs et d'autres personnes.

Assurez-vous que des règles soient établies au sein de votre établissement afin de déterminer, d'analyser et d'évaluer les risques liés à votre réseau.



Des risques nouveaux peuvent résulter de modifications de votre environnement réseau telles que des modifications de votre configuration réseau, la connexion d'appareils ou de composants supplémentaires à votre réseau, la déconnexion d'appareils ou de composants du réseau, ainsi que la mise à jour ou la mise à niveau d'appareils ou de composants du réseau.

Effectuez une nouvelle analyse des risques du réseau après chaque modification du réseau.



Avant de commencer le travail avec SICAT Suite, il est important de lire intégralement la présente notice d'instruction, et en particulier toutes les consignes de sécurité. Gardez cette notice d'instruction à portée de main pour y rechercher des informations.

JEUX DE DONNÉES

SICAT Function combine trois jeux de données différents :

- Les données de radiographie 3D, par exemple d'un Sirona GALILEOS
- Les données de mouvement de la mâchoire, par exemple d'un SICAT JMT*
- Des empreintes optiques numériques, par exemple d'un Sirona CEREC

INSTALLATION

L'installation de SICAT Suite est décrite sous *Installer SICAT Suite* [▶ Page 17 - SIDEXIS XG].

L'enregistrement manuel de SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG est décrit sous *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG* [▶ Page 36 - SIDEXIS XG].

VALIDER LA VERSION COMPLÈTE

- Si vous avez acheté une licence pour SICAT Function, activez la licence afin de valider la version complète. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [▶ Page 43 - SIDEXIS XG].



Si vous n'avez pas acheté de licence pour SICAT Function, ouvrez une radiographie 3D en mode viewer. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [▶ Page 189 - SIDEXIS XG].

RÉGLAGES

Effectuez les réglages souhaités dans la zone **Réglages**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [▶ Page 176 - SIDEXIS XG].

ACQUISITION DES DONNÉES

1. Pendant que le SICAT Fusion Bite est dans la bouche du patient, prenez un cliché 3D du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les guides rapides SICAT JMT*.
2. Réalisez l'acquisition des données de mouvement de la mâchoire du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les notices d'instruction SICAT JMT*.
3. Réalisez les empreintes optiques du maxillaire et de la mandibule. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de l'appareil correspondant.

OUVRIR UN JEU DE DONNÉES

- Pour travailler avec des données de SIDEXIS XG, ouvrez dans SIDEXIS XG un examen contenant une radiographie 3D et démarrez SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Démarrer SICAT Suite* [▶ Page 38 - SIDEXIS XG].

ÉTAPES DE TRAVAIL DANS SICAT FONCTION



ÉDITER UN JEU DE DONNÉES DANS SICAT FONCTION

1. Si nécessaire, adaptez l'orientation du volume et la zone panoramique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 94 - SIDEXIS XG].
2. Importez et recalez les données de mouvement de la mâchoire dans SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 106 - SIDEXIS XG].
3. Segmentez la mandibule et, le cas échéant, les fosses. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Segmenter la mandibule* [► Page 112 - SIDEXIS XG] et *Segmenter les fosses* [► Page 114 - SIDEXIS XG].
 - SICAT Function visualise les données de mouvement de la mâchoire importées dans la vue **3D**.
4. Importez les empreintes optiques et recalez-les sur les données de radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG].

5. Évaluez les mouvements de la mâchoire dans l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 64 - SIDEXIS XG] et *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 134 - SIDEXIS XG]. Utilisez les tracés anatomiques pour vous aider, en particulier lorsque vous n'avez pas effectué de segmentation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [▶ Page 131 - SIDEXIS XG], *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [▶ Page 132 - SIDEXIS XG], *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [▶ Page 133 - SIDEXIS XG] et *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 128 - SIDEXIS XG].
6. Définissez une position thérapeutique pour la gouttière thérapeutique OPTIMOTION. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [▶ Page 160 - SIDEXIS XG].
7. Commandez une gouttière thérapeutique OPTIMOTION. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [▶ Page 159 - SIDEXIS XG].
8. Exportez des données, p. ex. pour obtenir un deuxième avis. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [▶ Page 155 - SIDEXIS XG].

TERMINER OU INTERROMPRE LE TRAVAIL SUR LES JEUX DE DONNÉES

- Pour terminer ou interrompre votre travail, enregistrez-le en fermant SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fermer SICAT Suite* [▶ Page 191 - SIDEXIS XG].

NOTICE D'INSTRUCTION ET ASSISTANCE

La notice d'instruction est disponible dans la fenêtre **Aide de SICAT Suite**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir les instructions de service* [▶ Page 42 - SIDEXIS XG].

Une assistance supplémentaire est disponible dans la zone **Assistance**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Assistance* [▶ Page 185 - SIDEXIS XG].

13 ENREGISTRER ET SUPPRIMER SICAT SUITE EN TANT QUE PLUG-IN SIDEXIS XG



Lorsque vous installez SICAT Suite après SIDEXIS XG et que vous avez activé la case d'option correspondante, le programme d'installation de SICAT Suite procède automatiquement à l'enregistrement en tant que module SIDEXIS XG. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Installer SICAT Suite* [▶ Page 17 - SIDEXIS XG].

OUVRIR LA FENÊTRE "NGPLUGINMANAGER"

1. Appuyez sur la touche **Windows**, entrez **SIDEXIS Manager** puis cliquez sur le symbole **SIDEXIS Manager**.
▶ La fenêtre **SIDEXIS Manager** s'ouvre.
2. Dans la fenêtre **SIDEXIS Manager**, cliquez sur l'icône **NGPluginManager**.
3. Si nécessaire, acquittez le message du contrôle de compte d'utilisateur.
▶ La fenêtre **Plug-in manager** s'ouvre.

ENREGISTRER SICAT SUITE

- SICAT Suite a été installé avec succès. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [▶ Page 17 - SIDEXIS XG].
 - La fenêtre **Plug-in manager** est déjà ouverte.
1. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
 2. Allez dans le répertoire d'installation de SICAT Suite, par exemple C:\Program Files\SICAT\SICAT Suite.
 3. Sélectionnez le fichier *Sicat.PlanAndTreat.XG.exe*.
 4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
▶ SICAT Suite est enregistré en tant que plug-in SIDEXIS.


PLACER L'ICÔNE SICAT SUITE

1. Dans le menu, **Affichage**, cliquez sur l'option **Réglage**.
▶ La fenêtre **Réglage** s'ouvre avec l'onglet **Commandes**.
2. Sous **Catégories**, cliquez sur l'entrée **Program Plugins**.
3. Faites glisser l'icône **SICAT Suite** de la fenêtre **Réglage** à la position souhaitée dans la barre d'icônes de SIDEXIS XG.

SUPPRIMER SICAT SUITE

- SICAT Suite est déjà enregistré en tant que plug-in SIDEXIS XG.
 - La fenêtre **Plug-in manager** est déjà ouverte.
1. Sélectionnez l'entrée **SICAT Suite**.
 2. Cliquez sur le bouton **Remove**.
 3. Redémarrez SIDEXIS.
- ▶ SICAT Suite n'est plus disponible en tant que plug-in SIDEXIS XG.

14 DÉMARRER SICAT SUITE

 **ATTENTION**


Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.

 **ATTENTION**

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.

 **ATTENTION**


Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.


Pour démarrer SICAT Fonction vous devez tout d'abord démarrer SICAT Suite.

Procédez de la manière suivante pour démarrer SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG :

- SICAT Suite a été installé avec succès. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 17 - SIDEXIS XG].
 - SICAT Suite est déjà enregistré en tant que plug-in SIDEXIS XG. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Enregistrer et supprimer SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG* [► Page 36 - SIDEXIS XG]. Lorsque SICAT Suite est installé après SIDEXIS XG, l'enregistrement peut être réalisé automatiquement.
 - Le bouton SICAT Suite a déjà été mis en place dans SIDEXIS XG.
 - Vous avez déjà ouvert une radiographie 3D dans SIDEXIS XG.
 - Cliquez sur le bouton **SICAT Suite**.
- SICAT Suite ouvre le jeu de données dans une application SICAT.




Si vous ouvrez une radiographie 3D sans étude correspondante et que vous avez activé la licence d'une seule application SICAT, cette application SICAT va démarrer. Si vous ouvrez une radiographie 3D correspondant à plusieurs études et que vous avez activé les licences de plusieurs applications SICAT, c'est l'application SICAT dont l'étude a été modifiée en dernier qui démarrera.



Dans les deux cas suivants, les données sont uniquement ouvertes en mode viewer : Aucune licence n'est activée ou une autre station de travail SIDEXIS XG utilise les données. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [► Page 189 - SIDEXIS XG].

15 INTERFACE UTILISATEUR DE SICAT SUITE

L'interface utilisateur de SICAT Suite se compose des éléments suivants :

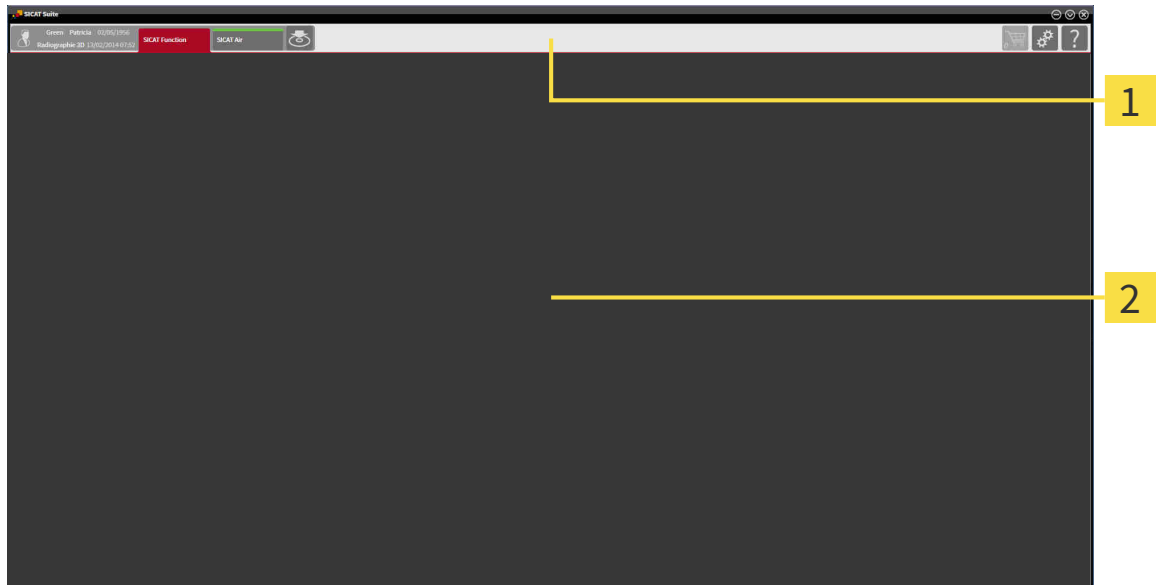

1 Barre de navigation

2 Zone d'application

- La barre de navigation, dans la partie supérieure de SICAT Suite, affiche des onglets permettant de commuter entre différentes fenêtres et applications.
- La **Zone d'application**, qui occupe le reste de l'espace de SICAT Suite, affiche l'interface utilisateur de l'application SICAT active.

La **Barre de navigation** comprend deux zones. La zone latérale gauche et la zone latérale droite sont toujours visibles.

La zone latérale gauche contient les onglets suivants :



- **Données patient et données de volume** - Attributs des données patient et des données de volume actives en fonction des réglages dans SIDEXIS XG.
- **Applications** - Boutons à l'aide desquels vous pouvez commuter entre les différentes applications SICAT. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter entre les applications SICAT* [▶ Page 41 - SIDEXIS XG].



- **Transmettre les données** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [▶ Page 155 - SIDEXIS XG].

La zone latérale droite contient les onglets suivants :



- **Panier d'achat** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [▶ Page 159 - SIDEXIS XG].



- **Réglages** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [▶ Page 176 - SIDEXIS XG].



- **Assistance** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Assistance* [▶ Page 185 - SIDEXIS XG].

16 COMMUTER ENTRE LES APPLICATIONS SICAT

Procédez de la manière suivante pour commuter entre les applications SICAT :



- Dans la **Barre de navigation**, cliquez sur le bouton qui porte la désignation de l'application SICAT souhaitée.
- ▶ SICAT Suite passe à l'application sélectionnée.


17 OUVRIR LES INSTRUCTIONS DE SERVICE

Les notices d'instruction des applications SICAT sont disponibles par la fenêtre **Assistance** sous forme de fichiers PDF.



Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Assistance** en cliquant sur l'icône **Assistance** dans la **Barre de navigation** ou en appuyant sur la touche F1.

La fenêtre **Assistance** présente l'aspect suivant :

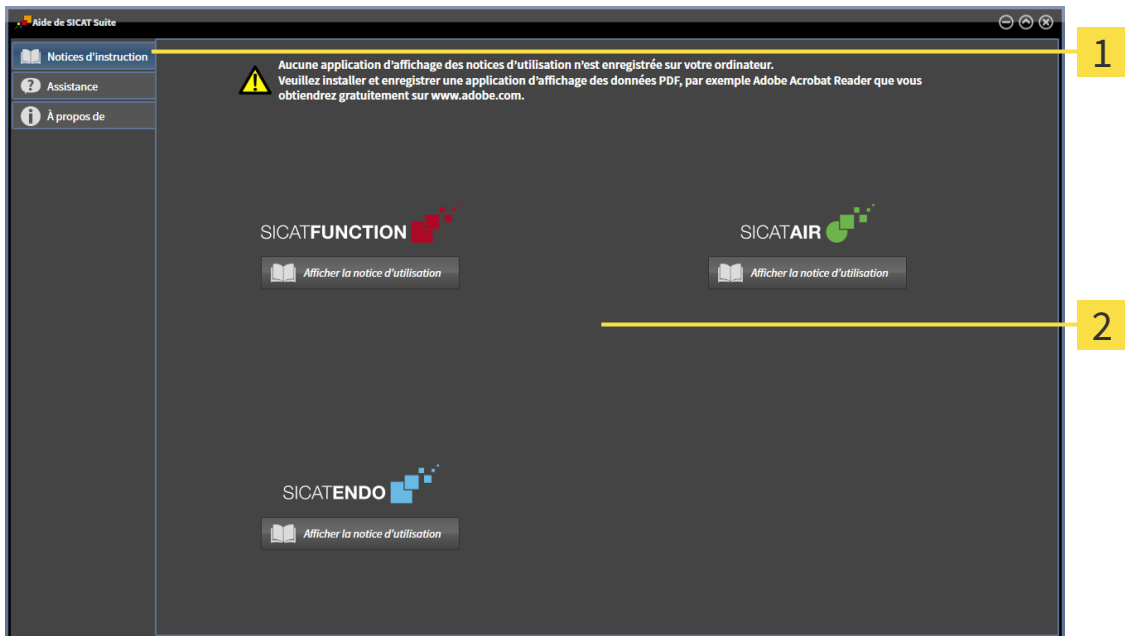

1 Onglet **Notice d'instruction**

2 Fenêtre **Notice d'instruction**

Vous pouvez ouvrir l'aide souhaitée en cliquant sur le bouton **Afficher la notice d'utilisation**.

18 LICENCES

SICAT Suite indique uniquement les applications SICAT pour lesquelles vous avez activé une licence.



Vous pouvez visionner des planifications SICAT Fonction dans la version de SICAT Suite liée à SIDEXIS aussi sans licence SICAT Fonction activée.

Les types de licences suivants existent :

- Une licence viewer avec laquelle vous pouvez utiliser une application sans limite de temps en mode viewer.
- Une licence de démonstration vous permettant d'obtenir un accès limité dans le temps aux versions complètes d'une ou de plusieurs applications SICAT.
- Une licence en version complète vous permettant d'obtenir un accès illimité dans le temps aux versions complètes d'une ou de plusieurs applications SICAT.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour activer une application SICAT ou une fonction individuelle.

- Vous contactez votre partenaire commercial local.
- Vous obtenez un code de bon échange.
- Vous générez une clé de licence à partir du code de bon échange sur SICAT Portal (accessible par la page d'accueil SICAT).
- SICAT ajoute la clé de licence à votre clé d'activation.
- Vous activez avec votre clé d'activation des applications SICAT ou différentes fonctions sur des ordinateurs sur lesquels SICAT Suite est installée.

Ci-après concerne l'activation et la désactivation de licences :

- Vous recevez uniquement des clés licence d'applications SICAT qui sont autorisées dans votre pays.
- Lorsque vous activez une clé d'activation sur un ordinateur, une licence d'applications SICAT comprises ou de fonctions comprises est respectivement liée à l'ordinateur. Les licences ne sont plus disponibles pour une activation sur un autre ordinateur.
- Vous pouvez désactiver des licences individuellement, pour chaque application SICAT, ou différentes fonctions. Les licences restituées sont disponibles pour une nouvelle activation sur le même ordinateur ou sur un autre.
- Si vous restituez la licence en version complète d'une application SICAT, vous recevez automatiquement une licence viewer dans la mesure où l'application est autorisée dans votre pays.
- Lorsque vous activez une licence en version complète, vous recevez automatiquement des licences complètes pour toutes les applications qui sont autorisées dans votre pays.

La conversion d'un code de bon échange dans une clé d'activation est décrite sous *Utiliser des codes de bon d'échange* [► Page 51 - SIDEXIS XG].

La fenêtre **Aperçu de vos licences** fournit une vue d'ensemble des licences qui sont activées sur votre ordinateur. SICAT Suite indique la date d'expiration des licences de démonstration. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [► Page 45 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez activer les licences de deux manières différentes :

- Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite dispose d'une connexion Internet active, il est possible de procéder à une activation automatique de la licence. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences via une connexion Internet active* [► Page 46 - SIDEXIS XG].
- Si vous le souhaitez, ou si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite ne dispose pas de connexion Internet active, vous pouvez procéder manuellement à l'activation de la licence en utilisant des fichiers de demande de licence. Vous devez télécharger ces fichiers de demande de licence sur la page Internet de SICAT. En contrepartie, vous recevez un fichier d'activation de licence que vous devez activer dans SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [► Page 48 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez désactiver individuellement des licences pour chaque application ou fonction. Après avoir désactivé une licence, vous pouvez entrer le même code d'activation ou un autre. Les licences restituées sont disponibles pour une activation sur le même ordinateur ou sur un autre. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 50 - SIDEXIS XG].

18.1 OUVRIR LA FENÊTRE "APERÇU DE VOS LICENCES"




1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur le symbole **Réglages**.

► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Licences**.

► La fenêtre **Aperçu de vos licences** s'ouvre :

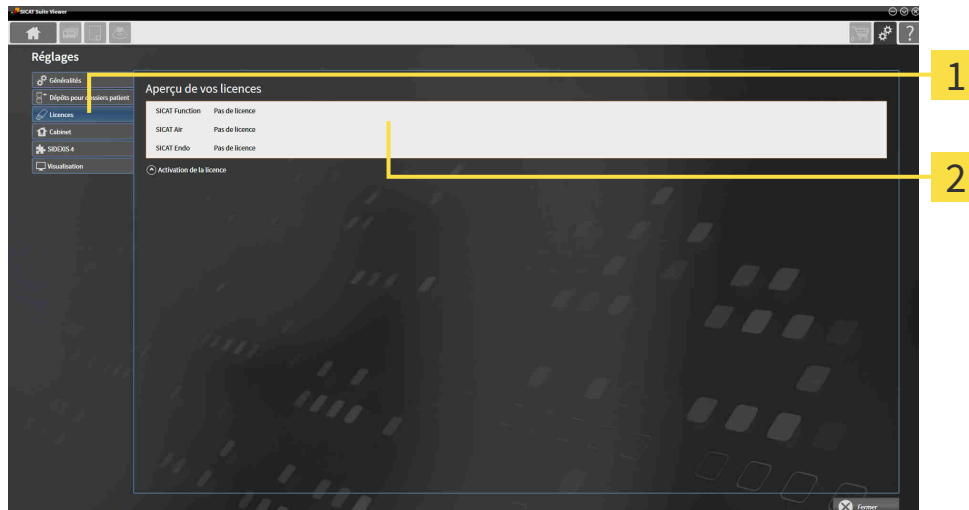

1 Onglet **Licences**

2 Fenêtre **Aperçu de vos licences**

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Activer des licences via une connexion Internet active* [► Page 46 - SIDEXIS XG]
- *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [► Page 48 - SIDEXIS XG]
- *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 50 - SIDEXIS XG]

18.2 ACTIVER DES LICENCES VIA UNE CONNEXION INTERNET ACTIVE


REMARQUE **Le panier doit être vide.**
Le panier doit être vide avant de pouvoir apporter des modifications sur les licences.

Procédez de la manière suivante pour démarrer la procédure d'activation :

- ☑ Il manque une licence activée à au moins une application SICAT ou une fonction individuelle.
- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [► Page 45 - SIDEXIS XG].

1. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur le bouton **Activation de la licence**.

► La zone **Aperçu de vos licences** est développée :

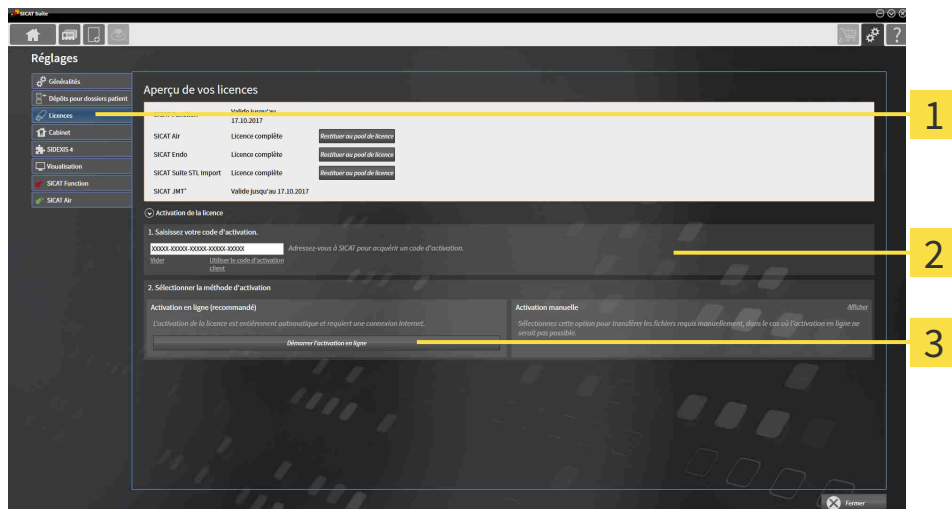

- 1** Bouton **Activation de la licence**
- 2** Zone **Saisissez votre code d'activation**
- 3** Bouton **Démarrer l'activation en ligne**

2. Saisissez votre clé d'activation dans le champ **Saisissez votre code d'activation**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'activation en ligne**.
4. Au cas où une fenêtre **Pare-feu Windows** s'ouvre, autorisez SICAT Suite à accéder à Internet.
 - Les licences acquises pour des applications ou des fonctions individuelles installées sont extraites de votre pool de licence et activées dans SICAT Suite sur votre ordinateur actuel.
 - La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été activée avec succès**.

REMARQUE**Redémarrage nécessaire**

Lorsque la version d'une application SICAT liée à SIDEXIS nécessite un redémarrage après une modification de licence, SICAT Suite ouvre une fenêtre d'avertissement correspondante.



Pour réactiver une application SICAT, vous pouvez utiliser votre clé d'activation client en cliquant sur le bouton **Utiliser le code d'activation client** dans la zone **Saisissez votre code d'activation**. Pour vider le champ contenant la clé de licence actuelle, vous pouvez cliquer sur le bouton **Vider**.


18.3 ACTIVER DES LICENCES MANUELLEMENT OU SANS CONNEXION INTERNET ACTIVE

REMARQUE Le panier doit être vide.
Le panier doit être vide avant de pouvoir apporter des modifications sur les licences.

Pour activer les licences manuellement ou sans connexion Internet active, procédez de la manière suivante :

- ☑ Il manque une licence activée à au moins une application SICAT ou une fonction individuelle.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [▶ Page 45 - SIDEXIS XG].

1. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur **Activation de la licence**.
 - ▶ La zone **Activation de la licence** est développée.
2. Cliquez sur **Afficher** dans la zone **Activation manuelle**.
 - ▶ La zone **Activation manuelle** est développée :

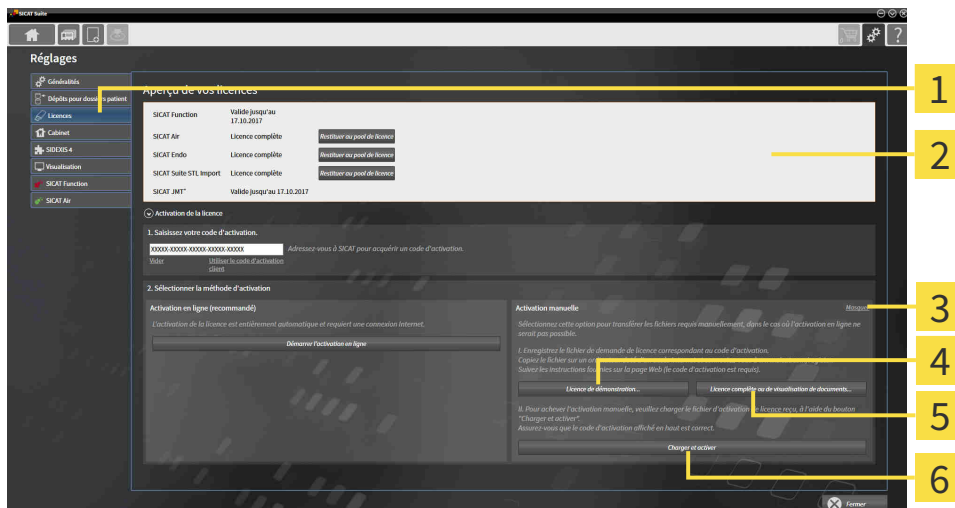

1 Activation de la licence

4 Bouton **Licence de démonstration**

2 Zone **Saisissez votre code d'activation**

5 Bouton **Licence complète ou de visualisation de documents**

3 **Afficher**

6 Bouton **Charger et activer**

3. Pour activer une licence complète, cliquez sur le bouton **Licence complète ou de visualisation de documents**.
4. Pour activer une licence de démonstration, cliquez sur le bouton **Licence de démonstration**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
5. Naviguez jusqu'au dossier souhaité pour le fichier de demande de licence, puis cliquez sur **OK**.
 - ▶ Un fichier de demande de licence avec l'extension **WibuCmRaC** est généré et enregistré dans le dossier sélectionné.

6. Copiez le fichier de demande de licence sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active, par exemple par l'intermédiaire d'une clé USB.
7. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.com/register>.
8. Suivez les instructions fournies sur la page Internet d'activation.
 - ▶ Les licences acquises pour les applications ou les fonctions installées sont extraites de votre pool de licences.
 - ▶ Le serveur de licences SICAT génère un fichier d'activation de licence avec l'extension **WibuCm-RaU**, que vous devez télécharger sur votre ordinateur.
9. Copiez le fichier d'activation de licence téléchargé sur l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite.
10. Contrôlez que le code d'activation correct est écrit dans le champ **Saisissez votre code d'activation**.
11. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur le bouton **Charger et activer**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
12. Naviguez jusqu'au fichier d'activation de licence, sélectionnez-le et cliquez sur **OK**.
 - ▶ La licence contenue dans le fichier d'activation de licence est installée dans SICAT Suite sur votre ordinateur actuel.
 - ▶ La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été activée avec succès**.

REMARQUE**Redémarrage nécessaire**

Lorsque la version d'une application SICAT liée à SIDEXIS nécessite un redémarrage après une modification de licence, SICAT Suite ouvre une fenêtre d'avertissement correspondante.

18.4 RESTITUER DES LICENCES AU POOL DE LICENCES


REMARQUE

Le panier doit être vide.

Le panier doit être vide avant de pouvoir apporter des modifications sur les licences.

Procédez de la manière suivante pour désactiver une licence complète et la restituer au pool de licences :

- ☑ Vous avez déjà activé la licence complète d'une application SICAT.
- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [► Page 45 - SIDEXIS XG].

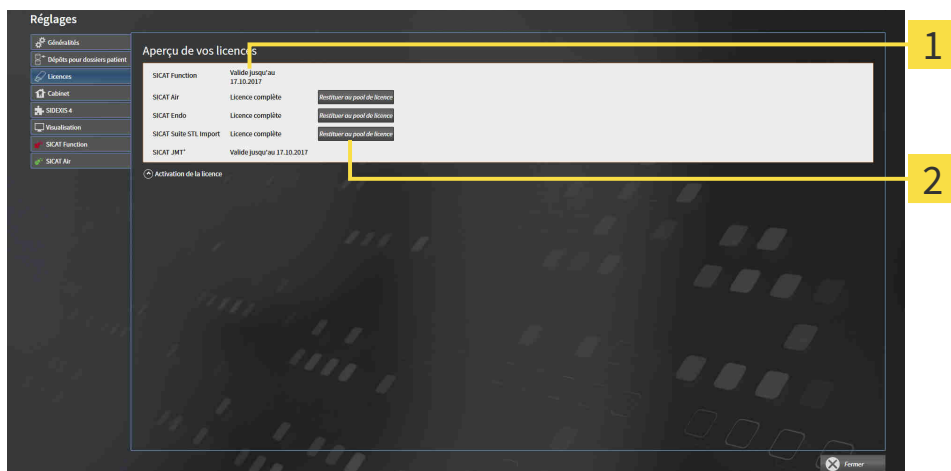

1 Statut de la licence des applications SICAT et fonctions individuelles

2 Bouton **Restituer au pool de licence**

- Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez dans la ligne de l'application SICAT ou de la fonction individuelle souhaitée sur le bouton **Restituer au pool de licence**.
- La licence sélectionnée est restituée à votre pool de licences et redevient disponible pour une nouvelle activation.
- La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été restituée au pool de licences avec succès.**
- Sans licence, une application reste disponible en mode viewer. Si les licences de toutes les applications SICAT ont été restituées au pool de licences, SICAT Suite passe entièrement en mode viewer.

REMARQUE

Redémarrage nécessaire

Lorsque la version d'une application SICAT liée à SIDEXIS nécessite un redémarrage après une modification de licence, SICAT Suite ouvre une fenêtre d'avertissement correspondante.



Si vous souhaitez désactiver une licence sur un ordinateur sans connexion Internet active, veuillez contacter l'assistance SICAT.

18.5 UTILISER DES CODES DE BON D'ÉCHANGE

1. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.com>.
2. Cliquez sur le lien vers SICAT Portal.
 - ▶ SICAT Portal s'ouvre.
3. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez dans la gestion des comptes sur l'entrée relative à la gestion de vos licences.
5. Saisissez votre code de bon d'échange et confirmez-le.
 - ▶ SICAT Portal génère une clé licence et ajoute la clé licence à votre clé d'activation.
6. Démarrez SICAT Suite et activez la licence.


Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences via une connexion Internet active* [▶ Page 46 - SIDEXIS XG] et *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [▶ Page 48 - SIDEXIS XG].



Vous trouverez une aide supplémentaire dans la FAQ dans SICAT Portal.

19 INTERFACE UTILISATEUR DE SICAT FUNCTION

L'interface utilisateur de SICAT Function se compose des éléments suivants :

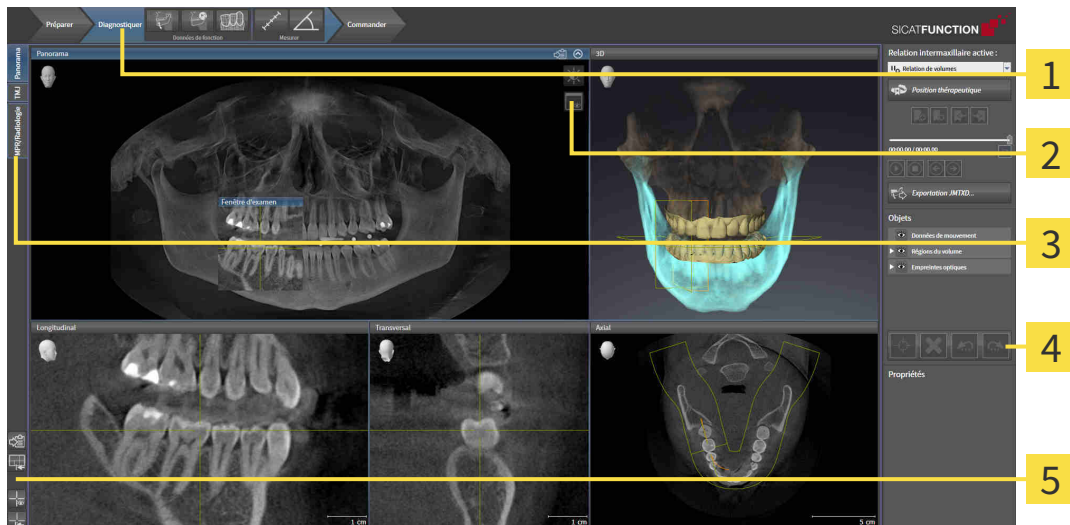

1 Barre d'outils de flux de travail

4 Barre d'objets

2 Barre d'outils de vue

5 Barre d'outils de l'espace de travail

3 Boutons de commutation entre les espaces de travail

- La **Barre d'outils de flux de travail** se compose des différentes étapes du flux de travail, qui contiennent les principaux outils du flux de travail de l'application. Il s'agit entre autres d'outils permettant d'ajouter et d'importer des objets de diagnostic et des objets de planification. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 53 - SIDEXIS XG].
- La **Surface de l'espace de travail** est la partie de l'interface utilisateur située en dessous de la **Barre d'outils de flux de travail**. Elle affiche l'espace de travail actif de SICAT Function. Chaque espace de travail contient un ensemble défini de vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Espaces de travail* [► Page 61 - SIDEXIS XG].
- Seule la vue active affiche la **Barre d'outils de vue**. Elle contient des outils permettant d'adapter la représentation de la vue correspondante. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation des vues* [► Page 71 - SIDEXIS XG] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - SIDEXIS XG].
- La **Barre d'objets** comprend des outils servant à la gestion des objets de diagnostic et de planification. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'objets* [► Page 55 - SIDEXIS XG].
- La **Barre d'outils de l'espace de travail** comprend des outils permettant de modifier les réglages généraux des espaces de travail et de toutes les vues qu'ils contiennent, et de documenter le contenu des espaces de travail. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [► Page 79 - SIDEXIS XG], *Réinitialiser les vues* [► Page 82 - SIDEXIS XG], *Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail* [► Page 68 - SIDEXIS XG] et *Créer des captures d'écran d'espaces de travail* [► Page 69 - SIDEXIS XG].

19.1 BARRE D'OUTILS DE FLUX DE TRAVAIL


Dans SICAT Fonction, la **Barre d'outils de flux de travail** est constituée de trois étapes de flux de travail :

1. **Préparer**
2. **Diagnostiquer**
3. **Commander**

RÉDUIRE OU DÉVELOPPER LES ÉTAPES DE FLUX DE TRAVAIL

Vous pouvez réduire ou développer les étapes de flux travail en cliquant dessus.

1. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « PRÉPARER »

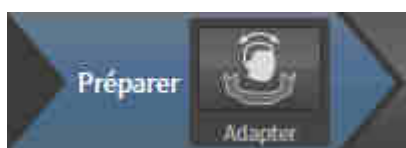

L'outil suivant est disponible dans l'étape de flux de travail **Préparer** :



- **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter l'orientation du volume* [▶ Page 96 - SIDEXIS XG] et *Adapter la zone panoramique* [▶ Page 101 - SIDEXIS XG].

2. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « DIAGNOSTIQUER »



Les outils suivants sont disponibles dans l'étape de flux de travail **Diagnostiquer** :



- **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 106 - SIDEXIS XG].



- **Segmenter la mandibule et les condyles** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Segmentation* [► Page 111 - SIDEXIS XG].



- **Importer et recalcr les empreintes optiques** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG].




- **Ajouter une mesure de distance (D)** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des mesures de distances* [► Page 150 - SIDEXIS XG].



- **Ajouter une mesure d'angle (A)** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des mesures d'angles* [► Page 151 - SIDEXIS XG].

3. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « COMMANDER »

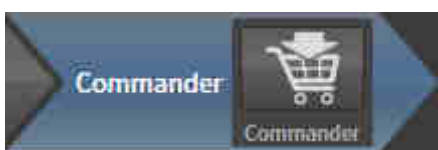


L'outil suivant est disponible dans l'étape de flux de travail **Commander** :



- **Commander la gouttière thérapeutique** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [► Page 162 - SIDEXIS XG].

19.2 BARRE D'OBJETS

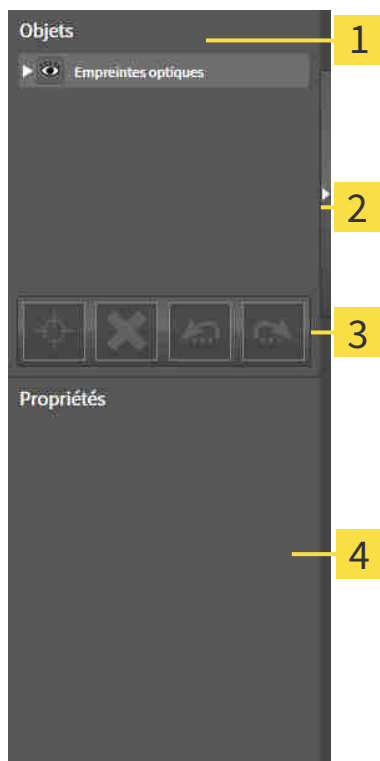

1 Navigateur d'objets

2 Bouton **Masquer la barre d'objets** ou bouton **Afficher la barre d'objets**

3 Barre d'outils d'objet

4 Zone **Propriétés**

La **Barre d'objets** comprend les éléments suivants :

- Le **Navigateur d'objets** affiche une liste classée par catégories de tous les objets de diagnostic et de planification que vous avez ajoutés ou importés à votre étude actuelle. Le **Navigateur d'objets** groupe les objets automatiquement. Le groupe **Mesures**, par exemple, contient tous les objets de mesure. Vous pouvez réduire ou développer les groupes d'objets, activer les objets et les groupes d'objets, et masquer et afficher les objets et les groupes d'objets. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 56 - SIDEXIS XG].
- La **Barre d'outils d'objet** comprend des outils permettant de focaliser des objets, de supprimer des objets ou des groupes d'objets et d'annuler ou de répéter des manipulations d'objets ou de groupes d'objets. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 58 - SIDEXIS XG].
- La zone **Propriétés** affiche des détails sur l'objet actif.


Vous pouvez changer la visibilité de la **Barre d'objets** avec deux boutons sur le côté droit **Barre d'objets**: **Masquer la barre d'objets** et **Afficher la barre d'objets**

Les objets qui sont disponibles dans SICAT Fonction sont décrits dans le paragraphe *Objets de SICAT Fonction* [► Page 59 - SIDEXIS XG].

19.3 GESTION DES OBJETS À L'AIDE DU NAVIGATEUR D'OBJETS

RÉDUIRE ET DÉVELOPPER LES GROUPES D'OBJETS

Procédez de la manière suivante pour réduire et développer un groupe d'objets :

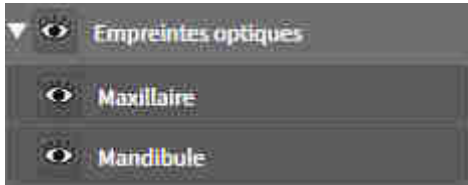

Le groupe d'objets de votre choix est développé.



1. Cliquez à côté du groupe d'objets de votre choix sur l'icône **Réduire**.

▶ Le groupe d'objets est réduit.



2. Cliquez à côté du groupe d'objets de votre choix sur l'icône **Développer**.

▶ Le groupe d'objets est développé.

ACTIVER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS

Certains outils ne sont disponibles que pour les objets ou groupes d'objets actifs.

Procédez de la manière suivante pour activer un objet ou un groupe d'objets :

L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est actuellement désactivé.

- Cliquez sur l'objet ou le groupe d'objets de votre choix.
 - ▶ SICAT Function désactive un objet ou un groupe d'objets précédemment activé.
 - ▶ SICAT Function active l'objet ou le groupe d'objet de votre choix.
 - ▶ SICAT Function met l'objet ou le groupe d'objet en relief en couleur dans le **Navigateur d'objets** et dans les vues.



Vous pouvez également activer certains objets dans les vues 2D en cliquant sur ces objets.

MASQUER ET AFFICHER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS



Cette fonction n'est disponible que pour certains types d'objets.

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher un objet ou un groupe d'objets :

- L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est actuellement affiché.



1. Cliquez à côté de l'objet ou du groupe d'objets de votre choix, sur l'icône **Affiché** ou sur l'icône **Partiellement affiché**.



- ▶ SICAT Function masque l'objet ou le groupe d'objets.
- ▶ SICAT Function affiche l'icône **Masqué** à côté de l'objet ou du groupe d'objets.



2. Cliquez à côté de l'objet ou du groupe d'objets de votre choix, sur l'icône **Masqué**.
 - ▶ SICAT Function affiche l'objet ou le groupe d'objets.
 - ▶ SICAT Function affiche l'icône **Affiché** à côté de l'objet ou du groupe d'objets.

19.4 GESTION DES OBJETS À L'AIDE DE LA BARRE D'OUTILS D'OBJET



Ces fonctions ne sont disponibles que pour certains types d'objets.

FOCALISER LES OBJETS

Utilisez cette fonction afin de trouver les objets dans les vues.

Procédez de la manière suivante pour focaliser un objet :

- ☑ L'objet voulu est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 56 - SIDEXIS XG].



- Cliquez sur l'icône **Focaliser l'objet actif (F)**.
- ▶ SICAT Function déplace le point de focalisation des vues sur l'objet actif.
- ▶ SICAT Function affiche l'objet actif dans les vues.



Vous pouvez également focaliser des objets à l'aide d'un double-clic sur ces objets dans le **Navigateur d'objets** ou dans une vue, à l'exception de la vue **3D**.

SUPPRIMER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS

Procédez de la manière suivante pour supprimer un objet ou un groupe d'objets :

- ☑ L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est déjà activé. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 56 - SIDEXIS XG].



- Cliquez sur l'icône **Supprimer un objet actif/groupe actif (Suppr)**.
- ▶ SICAT Function supprime l'objet ou le groupe d'objets.

ANNULER ET RÉPÉTER LES MANIPULATIONS D'UN OBJET

Procédez de la manière suivante pour annuler et répéter les dernières manipulations d'un objet ou d'un groupe d'objets :



1. Cliquez sur l'icône **Annuler la dernière manipulation d'un objet/groupe (Ctrl+Z)**.
 - ▶ SICAT Function annule la dernière manipulation d'un objet ou d'un groupe.



2. Cliquez sur l'icône **Répéter la manipulation d'un objet/groupe (Ctrl+Y)**.
 - ▶ SICAT Function répète la dernière manipulation annulée d'un objet ou d'un groupe.



Les fonctions annuler et répéter les manipulations ne sont disponibles que tant qu'une étude est ouverte dans une application SICAT.

19.5 OBJETS DE SICAT FONCTION

Dans le **Navigateur d'objets**, SICAT Function groupe les objets spécifiques à une application selon les critères suivants :


- **Données de mouvement**
- **Régions du volume**
 - **Mandibule**
- **Empreintes optiques**

DONNÉES DE MOUVEMENTOBJET



Une fois que vous avez importé les données de mouvement de la mâchoire, SICAT Function affiche un objet **Données de mouvement** dans le **Navigateur d'objets**.

RÉGIONS DU VOLUMEOBJET ET MANDIBULE OBJET

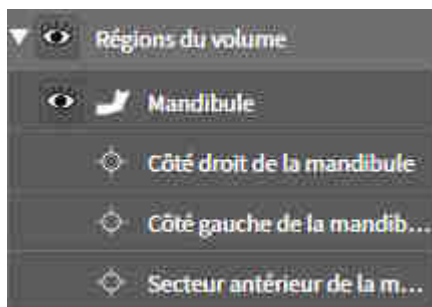


Une fois que vous avez segmenté la mâchoire inférieure, SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. L'objet **Régions du volume** contient l'objet **Mandibule**. L'objet **Mandibule** contient les sous-objets suivants :

- **Côté gauche de la mandibule**
- **Côté droit de la mandibule**
- **Secteur antérieur de la mandibule**

Si vous focalisez un des sous-objets, SICAT Function focalise l'objet sélectionné dans toutes les vues 2D.

OBJET EMPREINTES OPTIQUES

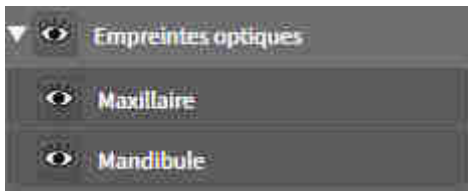

Une fois que vous avez importé et enregistré des empreintes optiques, SICAT Function affiche un objet **Empreintes optiques** dans le **Navigateur d'objets**. Un objet **Empreintes optiques** contient les sous-objets suivants :

- **Maxillaire**
- **Mandibule**

Si vous focalisez un des sous-objets, SICAT Function focalise l'objet sélectionné dans toutes les vues 2D.

Lorsque vous supprimez un objet **Maxillaire** ou un objet **Mandibule**, SICAT Function supprime toutes les empreintes optiques disponibles de l'étude.

20 ESPACES DE TRAVAIL

Les applications SICAT représentent des études dans différentes vues et disposent des ensembles de vues dans des espaces de travail.

SICAT Function dispose de trois espaces de travail différents :




- **Panorama**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail Panorama* [▶ Page 62 - SIDEXIS XG].
- **TMJ**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 64 - SIDEXIS XG].
- **MPR/Radiologie**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail MPR/Radiologie* [▶ Page 66 - SIDEXIS XG].

Les actions suivantes sont disponibles pour les espaces de travail et pour les vues qu'ils contiennent :

- *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 67 - SIDEXIS XG].
- *Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail* [▶ Page 68 - SIDEXIS XG].
- *Adaptation des vues* [▶ Page 71 - SIDEXIS XG].
- Il existe des possibilités supplémentaires pour adapter la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 84 - SIDEXIS XG].
- Vous pouvez documenter le contenu d'un espace de travail actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Créer des captures d'écran d'espaces de travail* [▶ Page 69 - SIDEXIS XG].

20.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL PANORAMA

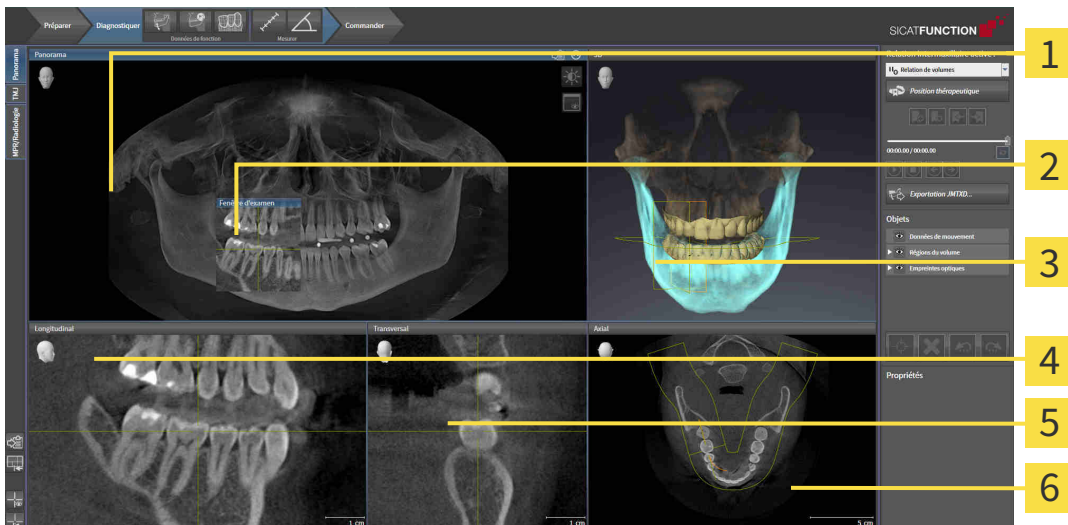

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 4 Longitudinal-Vue |
| 2 Fenêtre d'examen | 5 Transversal-Vue |
| 3 3D-Vue | 6 Axial-Vue |

VUE PANORAMA

La vue **Panorama** correspond à un orthopantomogramme (OPG) virtuel. Elle représente une projection orthogonale sur la courbe panoramique, avec une épaisseur définie. Vous pouvez adapter la courbe panoramique et l'épaisseur aux deux mâchoires. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Adapter la zone panoramique* [► Page 101 - SIDEXIS XG].

FENÊTRE D'EXAMEN

La **Fenêtre d'examen** est incluse dans la vue **Panorama**. Elle apporte la troisième dimension à la vue **Panorama** en visualisant des coupes parallèles à la courbe panoramique. Vous pouvez masquer et afficher la **Fenêtre d'examen**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 80 - SIDEXIS XG].

VUE 3D

La vue **3D** visualise une représentation 3D de l'étude ouverte.

VUE LONGITUDINAL

La vue **Longitudinal** représente des coupes qui sont tangentes à la courbe panoramique.

VUE TRANSVERSAL


La vue **Transversal** représente des coupes qui sont orthogonales à la courbe panoramique.

VUE AXIAL

Par défaut, la vue **Axial** représente des coupes vues du dessus. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Axial**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [▶ Page 182 - SIDEXIS XG].

Vous trouverez les fonctions des vues sous *Adaptation des vues* [▶ Page 71 - SIDEXIS XG] et *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 84 - SIDEXIS XG].

20.2 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL TMJ

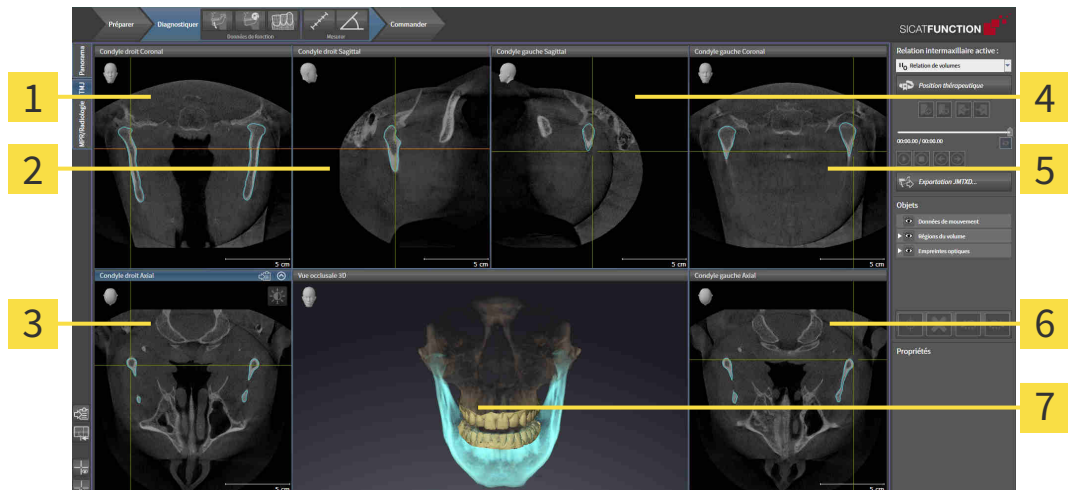


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Condyle droit Coronal-Vue | 5 Condyle gauche Coronal-Vue |
| 2 Condyle droit Sagittal-Vue | 6 Condyle gauche Axial-Vue |
| 3 Condyle droit Axial-Vue | 7 Vue occlusale 3D |
| 4 Condyle gauche Sagittal-Vue | |

Vous pouvez sélectionner les articulations anatomiques individuelles d'un patient dans la zone JMT et les examiner dans les vues. Vous trouverez des informations sur la zone JMT dans *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].

L'espace de travail **TMJ** visualise simultanément le condyle gauche et le condyle droit. Ceci permet une comparaison directe entre les deux articulations temporo-mandibulaires. La comparaison permet d'identifier des dissymétries de mouvement et de morphologie au niveau des articulations temporo-mandibulaires.

SICAT Function Les condyles en mouvement sont repérés différemment dans :

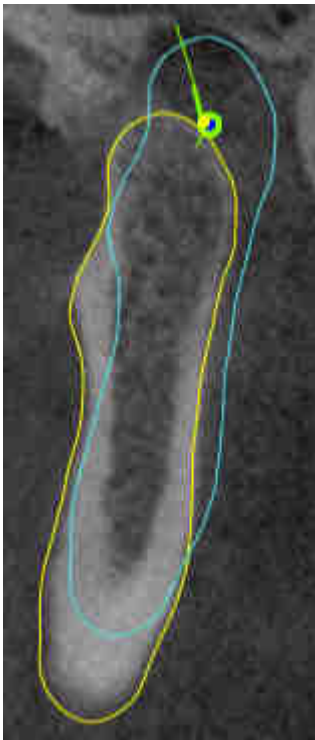


- Les condyles en mouvement dans les vues de coupe sont représentés dans SICAT Function avec un contour bleu.
- La limite de la segmentation dans les vues de coupe est représentée dans SICAT Function par un contour jaune.
- Les condyles en mouvement dans la vue de coupe **3D** sont représentés dans SICAT Function sous forme d'un objet 3D.

Pour faciliter la comparaison de l'ATM droite et de l'ATM gauche, les vues doivent être orientées par rapport au plan médian sagittal (plan de symétrie miroir) de la tête. Pour compenser des erreurs de positionnement pendant la radiographie 3D, utilisez la fonction **Adapter l'orientation du volume**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter l'orientation du volume* [▶ Page 96 - SIDEXIS XG]. Assurez-vous lors de l'orientation du volume, que les articulations temporo-mandibulaires soient le plus symétriques possibles par rapport au plan médian sagittal.

L'espace de travail **TMJ** offre des options supplémentaires pour l'analyse des données de mouvement de la mâchoire et des régions du volume. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 134 - SIDEXIS XG], *Utilisation du triangle de Bonwill* [▶ Page 137 - SIDEXIS XG], *Afficher la limite de la segmentation* [▶ Page 138 - SIDEXIS XG] et *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [▶ Page 139 - SIDEXIS XG].

20.3 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL MPR/RADIOLOGIE

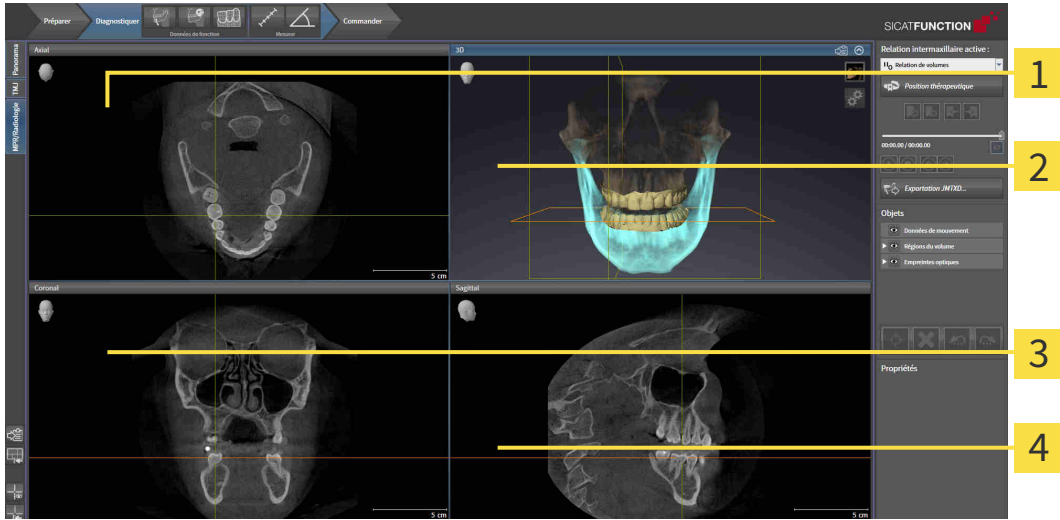

1 Axial-Vue

3 Coronal-Vue

2 3D-Vue

4 Sagittal-Vue

VUE AXIAL

Par défaut, la vue **Axial** représente des coupes vues du dessus. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Axial**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 182 - SIDEXIS XG].

VUE 3D

La vue **3D** visualise une représentation 3D de l'étude ouverte.

VUE CORONAL

La vue **Coronal** représente des coupes vues de devant.

VUE SAGITTAL

Par défaut, la vue **Sagittal** représente des coupes vues de la droite. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Sagittal**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 182 - SIDEXIS XG].

Vous trouverez les fonctions des vues sous *Adaptation des vues* [► Page 71 - SIDEXIS XG] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - SIDEXIS XG].

20.4 CHANGER D'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour changer d'espace de travail actif :



- Cliquez dans le coin supérieur gauche de la surface de l'espace de travail sur l'onglet de l'espace de travail désiré.
- ▶ L'espace de travail sélectionné s'ouvre.

20.5 ADAPTER ET RÉINITIALISER LA PRÉSENTATION DES ESPACES DE TRAVAIL

ADAPTER LA PRÉSENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour adapter la présentation de l'espace de travail actif :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la frontière entre deux ou plusieurs vues.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :



2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez le bouton enfoncé.
3. Déplacez la souris.
 - ▶ La position de la frontière est modifiée.
 - ▶ La taille de toutes les vues limitrophes est modifiée.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la position actuelle de la frontière et les tailles de toutes les vues limitrophes.

RÉINITIALISER LA PRÉSENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour réinitialiser la présentation de l'espace de travail actif :



- Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Réinitialiser la présentation de l'espace de travail actif**.
- ▶ SICAT Function restaure l'espace de travail actif à sa présentation standard. Autrement dit, le logiciel affiche toutes les vues dans leur taille par défaut.

20.6 CRÉER DES CAPTURES D'ÉCRAN D'ESPACES DE TRAVAIL

Vous pouvez copier des captures d'écran des espaces de travail dans le presse-papiers de Windows, à des fins de documentation.

COPIER UNE CAPTURE D'ÉCRAN D'UN ESPACE DE TRAVAIL DANS LE PRESSE-PAPIERS DE WINDOWS

Procédez de la manière suivante pour copier une capture d'écran de l'espace de travail dans le presse-papiers de Windows :

- L'espace de travail souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 67 - SIDEXIS XG].



- Cliquez dans la barre d'outils de l'espace de travail sur l'icône **Copier la copie d'écran de l'espace de travail actif dans le presse-papier**.

► SICAT Function copie une capture d'écran de l'espace de travail dans le presse-papiers de Windows.



Vous pouvez coller des captures d'écran du presse-papiers dans de nombreuses applications, par exemple des logiciels de traitement d'image et de traitement de texte. Dans la plupart des applications, le raccourci clavier Ctrl+V est utilisé pour la fonction coller.

21 VUES


Les vues sont contenues dans les espaces de travail. Vous trouverez une description des différents espaces de travail et des vues dans le paragraphe *Espaces de travail* [► Page 61 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez adapter les vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation des vues* [► Page 71 - SIDEXIS XG] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - SIDEXIS XG].

21.1 ADAPTATION DES VUES

Certains outils d'adaptation des vues ne sont disponibles que dans la vue active. L'activation d'une vue est décrite dans le paragraphe *Changer de vue active* [► Page 73 - *SIDEXIS XG*].

Une vue active contient les éléments suivants :

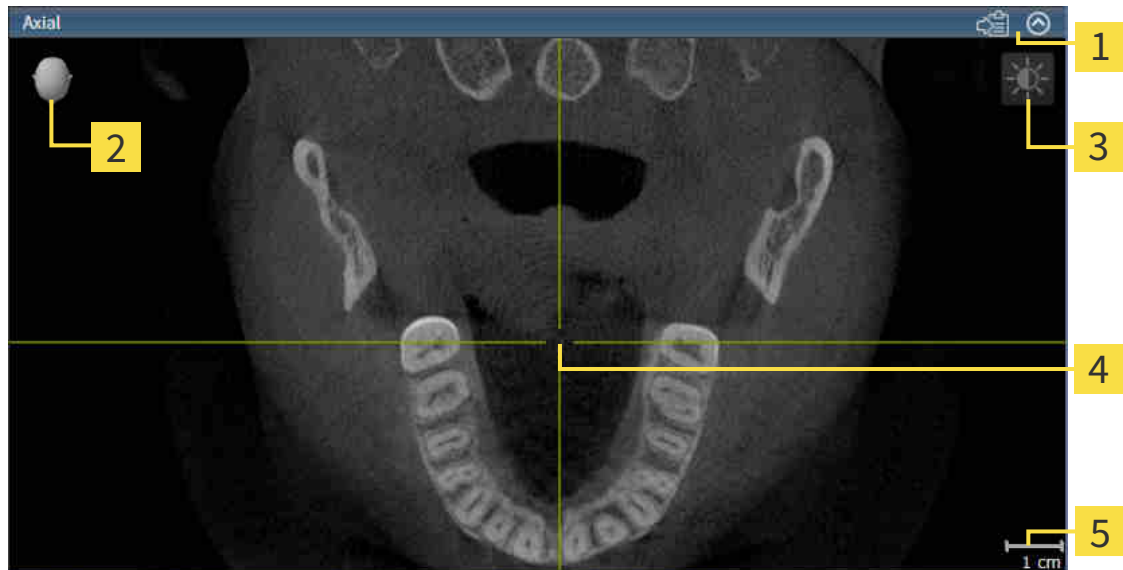

- 1** Barre de titre
- 2** Tête d'orientation
- 3** Barre d'outils de vue
- 4** Réticule
- 5** Échelle

Les vues de coupes 2D affichent des réticules. Les réticules sont des lignes d'intersection avec d'autres vues de coupes. SICAT Function synchronise toutes les vues de coupe entre elles. Autrement dit, tous les réticules indiquent la même position au sein des données de radiographie 3D. Ceci vous permet de corréler les structures anatomiques entre toutes les vues.

La vue **3D** affiche des cadres qui représentent la position actuelle des vues de coupes 2D.

Les actions suivantes sont disponibles pour adapter les vues :

- *Changer de vue active* [▶ Page 73 - SIDEXIS XG]
- *Maximiser et restaurer les vues* [▶ Page 74 - SIDEXIS XG]
- *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 75 - SIDEXIS XG]
- *Zoomer les vues et déplacer des extraits* [▶ Page 77 - SIDEXIS XG]
- *Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D* [▶ Page 78 - SIDEXIS XG]
- *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 79 - SIDEXIS XG]
- *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [▶ Page 80 - SIDEXIS XG]
- *Réinitialiser les vues* [▶ Page 82 - SIDEXIS XG]

Il existe des possibilités supplémentaires pour adapter la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 84 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez documenter le contenu d'une vue active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Créer des captures d'écran de vues* [▶ Page 83 - SIDEXIS XG].

21.2 CHANGER DE VUE ACTIVE

Seule la vue active affiche la **Barre d'outils de vue** et la barre de titre.


Procédez de la manière suivante pour activer une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix :



2. Cliquez dans la vue souhaitée.

► SICAT Function active la vue :

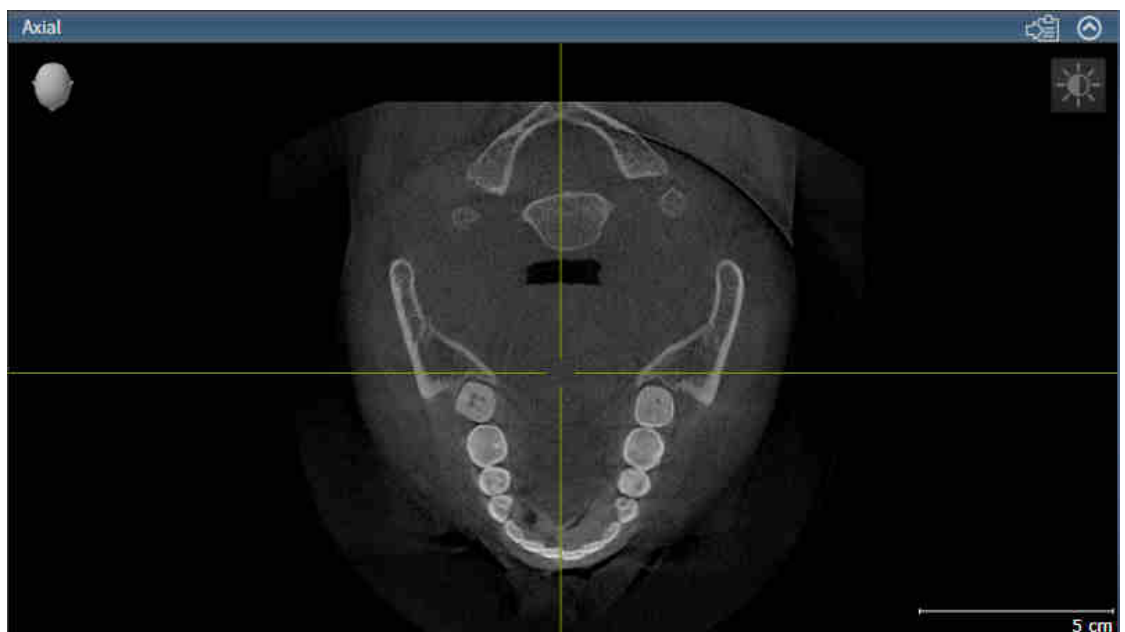

La vue activée est reconnaissable à la couleur orange de la barre de titre.

21.3 MAXIMISER ET RESTAURER LES VUES

Procédez de la manière suivante pour maximiser une vue et la restaurer à sa taille précédente :

- ☑ La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 73 - SIDEXIS XG].
- ☑ La vue de votre choix n'est pas maximisée.



1. Dans la barre de titre de la vue concernée, cliquez sur l'icône **Maximiser**.

▶ SICAT Function maximise la vue.



2. Dans la barre de titre de la vue maximisée, cliquez sur l'icône **Restaurer**.

▶ SICAT Function restaure la vue à sa taille précédente.



Les possibilités suivantes sont également disponibles pour maximiser des vues et les restaurer à leur taille précédente :

- Pour maximiser une vue, vous pouvez également double-cliquer sur la barre de titre de la vue concernée.
- Pour restaurer une vue à sa taille précédente, vous pouvez également double-cliquer sur la barre de titre de la vue maximisée.

21.4 ADAPTER ET RESTAURER LE CONTRASTE ET LA LUMINOSITÉ DES VUES 2D

Procédez de la manière suivante pour adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D :

- ☑ La vue 2D de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 73 - SIDEXIS XG].



1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue 2D sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**.

► La fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité** s'ouvre :



2. Amenez le pointeur de la souris sur le curseur **Luminosité**.
3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas.
 - SICAT Function adapte la luminosité de la vue 2D en fonction de la position du curseur **Luminosité**.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la luminosité actuelle de la vue 2D.



5. Amenez le pointeur de la souris sur le curseur **Contraste**.
6. Cliquez avec le bouton gauche de la souris en maintenant le bouton enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas.
 - SICAT Function adapte le contraste de la vue 2D en fonction de la position du curseur **Contraste**.
7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve le contraste actuel de la vue 2D.
8. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité**.
 - La fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité** se ferme.

Pour restaurer les valeurs de contraste et de luminosité par défaut de la vue 2D, vous pouvez cliquer sur l'icône **Réinitialiser la luminosité et le contraste**.



Les réglages de contraste et de luminosité de toutes les vues de coupes 2D sont couplés.

21.5 ZOOMER LES VUES ET DÉPLACER DES EXTRAITS

ZOOMER UNE VUE

La fonction de zoom agrandit ou réduit le contenu d'une vue.

Procédez de la manière suivante pour zoomer une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix.
2. Tournez la molette de la souris vers l'avant.
 - ▶ La vue est agrandie (zoom avant).
3. Tournez la molette de la souris vers l'arrière.
 - ▶ La vue est réduite (zoom arrière).



Une autre solution consiste à cliquer sur le bouton médian de la souris et à déplacer la souris vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

DÉPLACER L'EXTRAIT D'UNE VUE

Procédez de la manière suivante pour déplacer l'extrait d'une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton droit de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :
3. Déplacez la souris.
 - ▶ L'extrait de la vue se déplace en fonction du déplacement du pointeur de la souris.
4. Relâchez le bouton droit de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve l'extrait actuel de la vue.

21.6 NAVIGUER DANS LES COUPES DES VUES DE COUPES 2D

Procédez de la manière suivante pour naviguer dans les coupes dans une vue de coupes 2D :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une flèche bidirectionnelle.
3. Déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.
 - ▶ À l'exception de la coupe **Transversal**, les coupes se déplacent parallèlement.
 - ▶ La coupe **Transversal** se déplace le long de la courbe panoramique.
 - ▶ SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.
 - ▶ SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la coupe actuelle.

21.7 DÉPLACER, MASQUER ET AFFICHER LES RÉTICULES ET LES CADRES

DÉPLACER UN RÉTICULE

Procédez de la manière suivante pour déplacer le réticule dans une vue de coupe 2D :

Tous les réticules et tous les cadres sont affichés.

1. Amenez le pointeur de la souris dans la vue de votre choix, sur le centre du réticule.

▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un réticule :



2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Déplacez la souris.

▶ Le réticule de la vue suit le déplacement de la souris.

▶ SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.

▶ SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.

4. Relâchez le bouton gauche de la souris.

▶ SICAT Function conserve la position actuelle du réticule.



Pour déplacer directement le réticule à la position du pointeur de la souris, vous pouvez également double-cliquer dans une vue 2D.

MASQUER ET AFFICHER LES RÉTICULES ET LES CADRES

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher tous les réticules et tous les cadres :

Tous les réticules et tous les cadres sont affichés.



1. Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Masquer les réticules et les cadres**.

▶ SICAT Function masque les réticules dans toutes les vues de coupes 2D.

▶ SICAT Function masque les cadres dans la vue **3D**.



2. Cliquez sur l'icône **Afficher les réticules et les cadres**.

▶ SICAT Function affiche les réticules dans toutes les vues de coupes 2D.

▶ SICAT Function affiche les cadres dans la vue **3D**.

21.8 DÉPLACER, MASQUER ET AFFICHER LA FENÊTRE D'EXAMEN

DÉPLACER LA FENÊTRE D'EXAMEN

Procédez de la manière suivante pour déplacer la **Fenêtre d'examen** :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 67 - SIDEXIS XG].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée :



1. Dans la vue **Panorama**, amenez le pointeur de la souris sur la barre de titre de la **Fenêtre d'examen**.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une main.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Déplacez la souris.
 - La **Fenêtre d'examen** suit le déplacement de la souris.
 - SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.
 - SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle de la **Fenêtre d'examen**.

MASQUER ET AFFICHER LA FENÊTRE D'EXAMEN



L'icône indiquant si la **Fenêtre d'examen** est affichée ou masquée sert à la fois d'indicateur d'état et de commutateur.

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher la **Fenêtre d'examen** :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 67 - SIDEXIS XG].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée.



1. Dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **Panorama**, cliquez sur l'icône **Masquer la fenêtre d'examen**.

▶ SICAT Fonction masque la **Fenêtre d'examen**.



2. Dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **Panorama**, cliquez sur l'icône **Afficher la fenêtre d'examen**.

▶ SICAT Fonction affiche la **Fenêtre d'examen**.

21.9 RÉINITIALISER LES VUES

Procédez de la manière suivante pour réinitialiser toutes les vues :



- Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Réinitialiser les vues**.
- ▶ SICAT Function restaure toutes les vues à leurs valeurs par défaut en ce qui concerne le zoom, le déplacement des extraits, la navigation, le déplacement des réticules et le déplacement de la **Fenêtre d'examen**.
- ▶ SICAT Function réinitialise le sens de vision de la vue **3D** à sa valeur par défaut.

21.10 CRÉER DES CAPTURES D'ÉCRAN DE VUES

Vous pouvez créer des captures d'écran des vues à des fins de documentation, et les éditer de différentes manières :

- en les exportant dans l'examen SIDEXIS XG actuel.
- en les copiant dans le presse-papiers de Windows.

EN EXPORTANT LA CAPTURE D'ÉCRAN DANS L'EXAMEN SIDEXIS ACTUEL

Procédez de la manière suivante pour exporter une capture d'écran d'une vue vers l'examen SIDEXIS actuel :

- La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 73 - SIDEXIS XG].



- Dans la barre de titre de la vue, cliquez sur l'icône **Exporter la capture d'écran dans l'examen SIDEXIS actuel**.

- ▶ SICAT Function exporte une capture d'écran de la vue vers l'examen SIDEXIS actuel.

Si vous ouvrez une capture d'écran depuis SIDEXIS XG que vous avez créée dans une application SICAT, l'application SICAT démarre avec l'étude afférente.

COPIER LA CAPTURE D'ÉCRAN D'UNE VUE DANS LE PRESSE-PAPIERS DE WINDOWS

Procédez de la manière suivante pour copier une capture d'écran d'une vue dans le presse-papiers de Windows :

- La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 73 - SIDEXIS XG].



- Dans la barre de titre de la vue, cliquez sur l'icône **Copier la capture d'écran dans le presse-papiers (Ctrl+C)**.

- ▶ SICAT Function copie une capture d'écran de la vue dans le presse-papiers de Windows.



Vous pouvez coller des captures d'écran du presse-papiers dans de nombreuses applications, par exemple des logiciels de traitement d'image et de traitement de texte. Dans la plupart des applications, le raccourci clavier Ctrl+V est utilisé pour la fonction coller.

22 ADAPTATION DE LA VUE 3D

Vous pouvez modifier à tout moment le sens de vision de la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier le sens de vision de la vue 3D* [▶ Page 85 - SIDEXIS XG].

Les actions suivantes sont disponibles pour configurer la vue **3D** :

- *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [▶ Page 89 - SIDEXIS XG]
- *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [▶ Page 90 - SIDEXIS XG]
- *Déplacer l'extrait* [▶ Page 92 - SIDEXIS XG]

22.1 MODIFIER LE SENS DE VISION DE LA VUE 3D

Vous disposez de deux possibilités pour modifier le sens de vision de la vue **3D** :

- Modification interactive
- Sélection du sens de vision par défaut

MODIFIER LE SENS DE VISION DE LA VUE 3D DE MANIÈRE INTERACTIVE

Procédez de la manière suivante pour modifier de manière interactive le sens de vision de la vue **3D** :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue **3D**.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une main.
3. Déplacez la souris.
 - ▶ Le sens de vision change en fonction du déplacement de la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve le sens de vision actuel de la vue **3D**.

SÉLECTION DU SENS DE VISION PAR DÉFAUT

Procédez de la manière suivante pour sélectionner un sens de vision par défaut dans la vue **3D** :



1. Amenez le pointeur de la souris dans le coin supérieur gauche de la vue **3D** sur l'icône Tête d'orientation.
 - ▶ La fenêtre transparente **Sens de vision** s'ouvre :



- ▶ Au centre de la fenêtre transparente **Sens de vision**, la Tête d'orientation mise en relief indique le sens de vision actuel.
2. Cliquez sur l'icône de Tête d'orientation représentant le sens de vision par défaut désiré.
 - ▶ Le sens de vision de la vue **3D** change en fonction de votre choix.
 3. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Sens de vision**.
 - ▶ La fenêtre transparente **Sens de vision** se ferme.

22.2 TYPES DE REPRÉSENTATION DE LA VUE 3D

Vous trouverez des informations générales sur la vue **3D** dans *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - *SIDEXIS XG*].

SICAT Function offre deux types de représentation différentes pour la vue **3D** :



- Le type de représentation **Vue d'ensemble** visualise l'ensemble de la radiographie 3D.





- Le type de représentation **Extrait** visualise uniquement un extrait de la radiographie 3D. Cet extrait peut être déplacé.



Pour activer un type de représentation de la vue **3D**, reportez-vous à *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 89 - SIDEXIS XG].

La configuration du type de représentation actif est décrite sous *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [► Page 90 - SIDEXIS XG].

22.3 COMMUTER LE TYPE DE REPRÉSENTATION DE LA VUE 3D




Tous les types de représentation sont disponibles dans tous les espaces de travail.

Procédez de la manière suivante pour commuter le type de représentation de la vue **3D** :

- ☑ La vue **3D** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 73 - *SIDEXIS XG*].

1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **3D** sur l'icône **Commuter le type de représentation**.

▶ La fenêtre transparente **Commuter le type de représentation** s'ouvre :

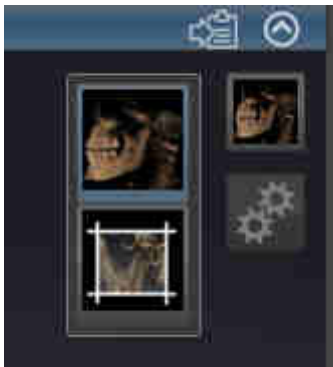

2. Cliquez sur l'icône du type de représentation souhaité.
 - ▶ SICAT Function active le type de représentation désiré.
 3. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Commuter le type de représentation**.
- ▶ La fenêtre transparente **Commuter le type de représentation** se ferme.

22.4 CONFIGURER LE TYPE DE REPRÉSENTATION ACTIF DE LA VUE 3D



Seuls les types de représentation configurables affichent l'icône **Configurer le type de représentation actif**. La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** visualise uniquement les réglages qui s'appliquent au type de représentation actif.

Procédez de la manière suivante pour configurer le type de représentation actif de la vue **3D** :

- ☑ La vue **3D** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 73 - SIDEXIS XG].
- ☑ Le type de représentation souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 89 - SIDEXIS XG].
- ☑ Le type de représentation actif est configurable.



1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **3D** sur l'icône **Configurer le type de représentation actif**.

► La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** s'ouvre :



2. Déplacez les curseurs de votre choix.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de la position des curseurs.
3. S'il est disponible, cliquez sur le symbole de la flèche à côté de **Réglages avancés**.
 - La zone **Réglages avancés** est développée.
4. Cochez ou décochez les cases disponibles.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de l'état des cases à cocher.
5. Déplacez les curseurs de votre choix.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de la position des curseurs.
6. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif**.
 - La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** se ferme.



Vous pouvez réinitialiser les réglages aux valeurs par défaut en cliquant sur le bouton **Réinitialiser la configuration du type de représentation actif au réglage par défaut.**



Pour enregistrer les réglages actuels en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer la configuration du type de représentation actif comme réglage par défaut.**



S'il est disponible, déplacez le curseur **Vitesse de représentation** vers la gauche dans le cas d'ordinateurs lents.

22.5 DÉPLACER L'EXTRAIT


Vous trouverez des informations générales sur la vue **3D** dans *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - *SIDEXIS XG*].

Le type de représentation **Extrait** vous permet de masquer des parties du volume dans la vue **3D**. SICAT Function ne représente alors qu'une tranche extraite du volume, dont la position dans SICAT Function est synchronisée avec le réticule. Procédez de la manière suivante pour déplacer la tranche extraite du volume :

- Vous avez déjà activé le type de représentation **Extrait**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 89 - *SIDEXIS XG*].



- Naviguez dans la vue **Axial**, **Coronal** ou **Sagittal** jusqu'à la coupe souhaitée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D* [▶ Page 78 - SIDEXIS XG].
- ▶ SICAT Function déplace l'extrait en fonction de la coupe sélectionnée :

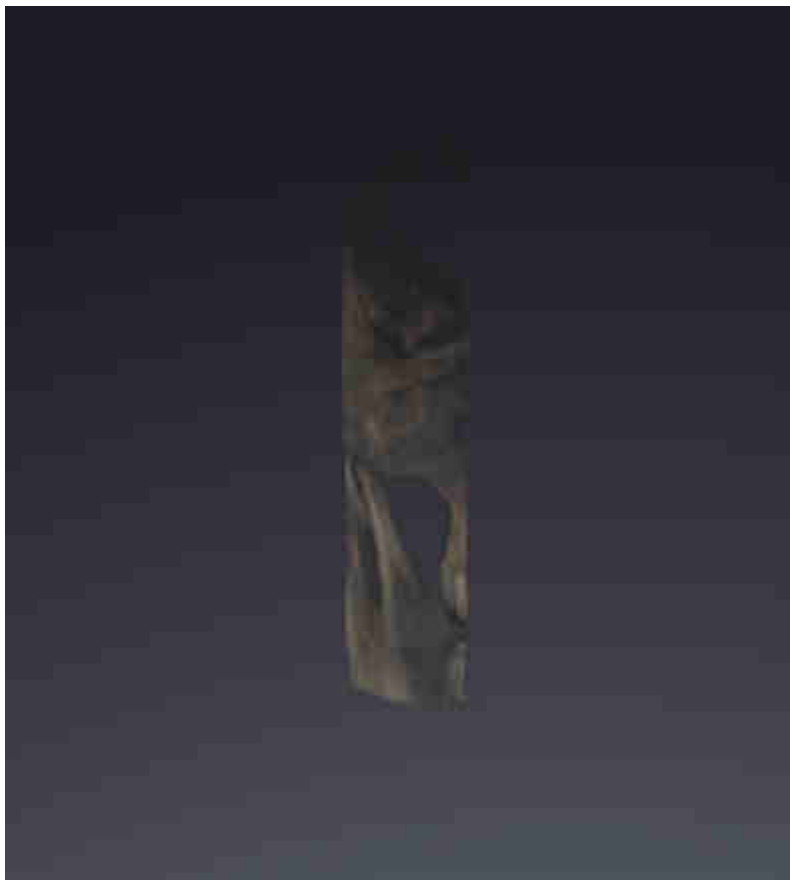

23 ORIENTATION DU VOLUME ET ZONE PANORAMIQUE



Si une adaptation de l'orientation du volume s'avère nécessaire, effectuez cette adaptation au début de votre travail sur la radiographie 3D. Si vous adaptez l'orientation du volume ultérieurement, vous serez éventuellement obligé de refaire en partie votre diagnostic ou votre planification.

ORIENTATION DU VOLUME

Vous pouvez adapter l'orientation du volume pour toutes les vues en tournant le volume autour des trois axes principaux. Ceci peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants :


- Positionnement non optimal du patient lors de la radiographie 3D
- Orientation en fonction du cas d'application, p. ex. orientation des coupes axiales parallèle à l'horizontale de Francfort ou au plan d'occlusion
- Optimisation de la vue panoramique

Si vous adaptez l'orientation du volume dans SICAT Function, toutes les autres applications SICAT reprennent vos adaptations.

Pour adapter l'orientation du volume, reportez-vous au paragraphe *Adapter l'orientation du volume* [► Page 96 - SIDEXIS XG].

ZONE PANORAMIQUE

SICAT Function calcule la vue **Panorama** sur la base du volume et de la zone panoramique. Pour optimiser la vue **Panorama**, il convient d'adapter la zone panoramique aux deux maxillaires du patient. Cette opération est importante pour l'efficacité du diagnostic et de la planification du traitement.

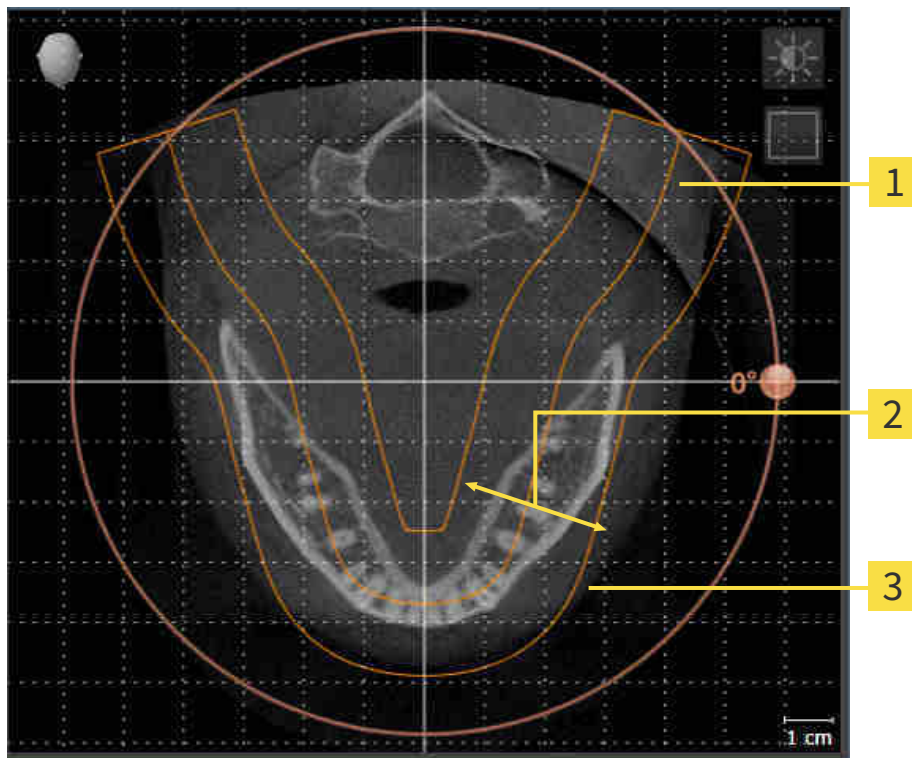

1 Courbe panoramique

2 Épaisseur

3 Zone panoramique

La zone panoramique est définie par les deux composants suivants :

- Forme et position de la courbe panoramique
- Épaisseur de la zone panoramique

Pour une adaptation optimale de la zone panoramique, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies :

- La zone panoramique doit contenir l'intégralité des dents des deux mâchoires
- La zone panoramique doit être aussi fine que possible.

Si vous adaptez la zone panoramique dans SICAT Function, toutes les autres applications SICAT reprennent vos adaptations.

Pour adapter la zone panoramique, reportez-vous au paragraphe *Adapter la zone panoramique* [► Page 101 - SIDEXIS XG].

23.1 ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME

Vous trouverez des informations générales sur l'orientation du volume dans *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 94 - SIDEKIS XG].

L'adaptation de l'orientation du volume se compose des étapes suivantes :


- Ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**
- Tourner le volume dans la vue **Coronal**
- Tourner le volume dans la vue **Sagittal**
- Tourner le volume dans la vue **Axial**

OUVRIER LA FENÊTRE "ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME ET LA ZONE PANORAMIQUE"

☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



- Cliquez sur l'icône **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**.
- La fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** s'ouvre :

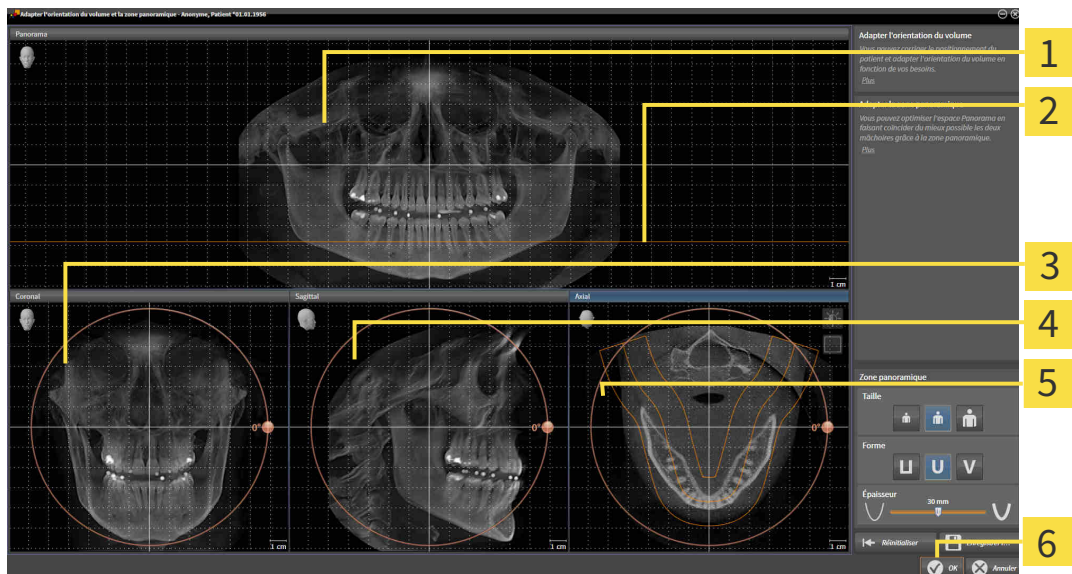

1 Panorama-Vue

2 Ligne de référence axiale

3 CoronalVue avec bouton de réglage **Rotation**


4 SagittalVue avec bouton de réglage **Rotation**

5 AxialVue avec bouton de réglage **Rotation**

6 Bouton **OK**

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE CORONAL

1. Activez la vue **Coronal** :

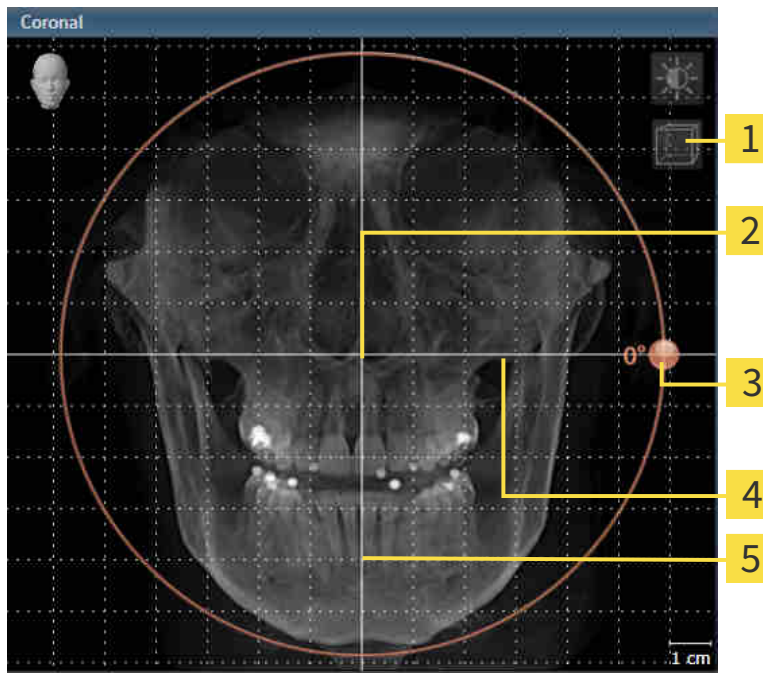


- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Activer le mode coupes ou symbole Activer le mode projection | 4 Ligne de référence horizontale |
| 2 Centre de rotation | 5 Ligne de référence verticale |
| 3 Rotation Bouton de réglage | |

2. Assurez-vous que le mode projection est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.
3. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
4. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
5. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Coronal** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
6. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE SAGITTAL

1. Activez la vue **Sagittal** :

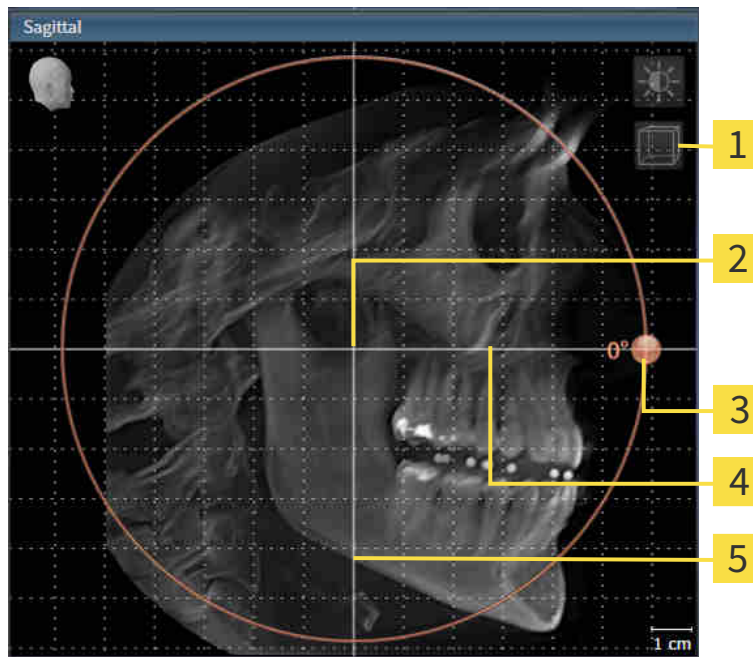


- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Activer le mode coupes ou symbole Activer le mode projection | 4 Ligne de référence horizontale |
| 2 Centre de rotation | 5 Ligne de référence verticale |
| 3 Rotation Bouton de réglage | |

2. Assurez-vous que le mode projection est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.
3. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
4. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
5. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Sagittal** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
6. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE AXIAL

1. Activez la vue **Axial** :

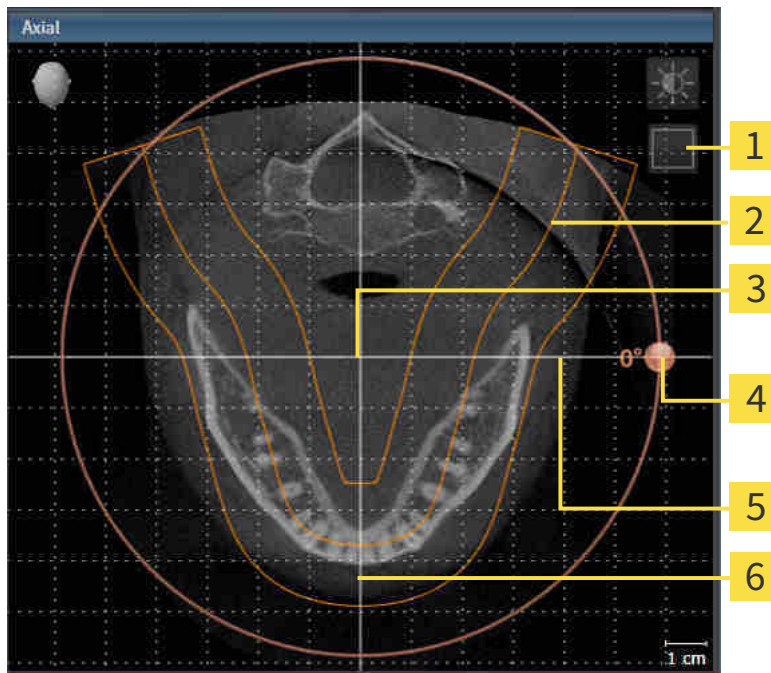

- | | |
|---|--|
| 1 Symbole Activer le mode projection ou symbole Activer le mode coupes | 4 Rotation Bouton de réglage |
| 2 Zone panoramique | 5 Ligne de référence horizontale |
| 3 Centre de rotation | 6 Ligne de référence verticale |

2. Assurez-vous que le mode coupes est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes**.
3. Naviguez jusqu'à une coupe contenant les racines des dents mandibulaires, par exemple en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la ligne de référence axiale dans la vue panoramique et en déplaçant la souris vers le haut ou vers le bas tout en maintenant le bouton gauche enfoncé.
4. Si nécessaire, déplacez la zone panoramique dans la vue **Axial** en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la zone panoramique et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. SICAT Function déplace le centre de rotation, la ligne de référence horizontale et la ligne de référence verticale en conséquence.
5. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
6. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
7. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Axial** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
8. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la zone panoramique, de ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

9. Pour enregistrer vos adaptations, cliquez sur **OK**.
 - ▶ Si l'adaptation du volume a des répercussions sur des objets existants dans des applications SICAT, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement qui vous informe sur ces conséquences exactes.
10. Si vous souhaitez malgré cela effectuer l'orientation du volume, cliquez dans la fenêtre d'avertissement sur le bouton **Adapter**.
 - ▶ SICAT Function enregistre l'orientation du volume adaptée et représente le volume dans les autres vues avec l'orientation correspondante.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D en activant la vue souhaitée et en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 75 - SIDEXIS XG].
- Vous pouvez zoomer des vues. SICAT Function synchronise le zoom entre les vues, sauf la vue **Axial**.
- Pour réinitialiser l'orientation du volume et la zone panoramique, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Pour enregistrer l'orientation actuelle du volume et la zone panoramique actuelle en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer le réglage par défaut**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

23.2 ADAPTER LA ZONE PANORAMIQUE

Vous trouverez des informations générales sur la zone panoramique dans *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 94 - *SIDEXIS XG*].

L'adaptation de la zone panoramique se compose des étapes suivantes :


- Ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**
- Adapter la position de coupe de la vue **Axial**
- Déplacer la zone panoramique
- Tourner le volume dans la vue **Axial**
- **Taille** Adapter la **Forme** et l'**Épaisseur** de la zone panoramique

OUVRIRE LA FENÊTRE "ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME ET LA ZONE PANORAMIQUE"

☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



- Cliquez sur l'icône **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**.
- La fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** s'ouvre :

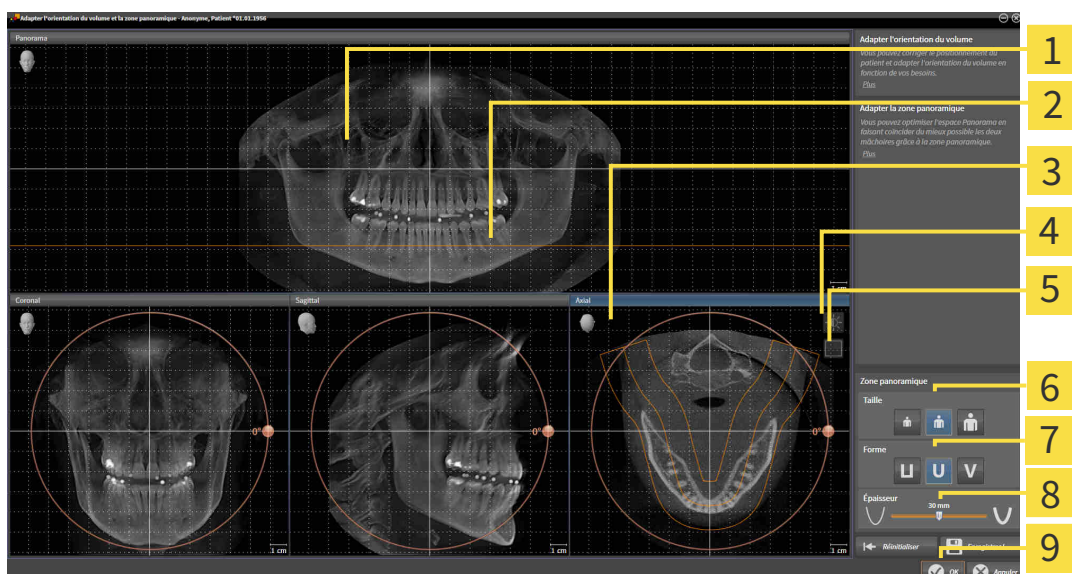

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 6 Taille-Boutons |
| 2 Ligne de référence axiale | 7 Forme-Boutons |
| 3 AxialVue avec curseur Rotation | 8 Épaisseur Curseur |
| 4 Symbole Adapter le contraste et la luminosité | 9 Bouton OK |
| 5 Symbole Activer le mode projection ou symbole Activer le mode coupes | |

ADAPTER LA POSITION DE COUPE DE LA VUE AXIAL



1. Assurez-vous que le mode coupe est activé dans la vue **Axial**. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes**.
2. Dans la vue **Panorama**, amenez le pointeur de la souris sur la ligne de référence axiale. La ligne de référence axiale représente la position de coupe actuelle de la vue **Axial**.
3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
4. Déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.
 - ▶ La coupe de la vue **Axial** est adaptée en fonction de la position de la ligne de référence axiale dans la vue **Panorama**.
5. Lorsque la ligne de référence axiale se trouve sur les racines des dents mandibulaires, relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ La vue **Axial** conserve la coupe actuelle.

DÉPLACER LA ZONE PANORAMIQUE

1. Dans la vue **Axial**, déplacez le pointeur de la souris sur la zone panoramique.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :
3. Déplacez la souris.
 - ▶ SICAT Function déplace la zone panoramique en fonction de la position du pointeur de la souris.
4. Lorsque la courbe centrale de la zone panoramique suit le tracé des racines des dents de la mandibule, relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ La zone panoramique conserve sa position actuelle.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE AXIAL

1. Dans la vue **Axial**, amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - ▶ SICAT Function tourne alors le volume dans la vue **Axial** en suivant un cercle autour du centre de rotation et adapte les autres vues en conséquence.
4. Lorsque le tracé des racines des dents de la mandibule suit la courbe centrale de la zone panoramique, relâchez le bouton gauche de la souris.

ADAPTER LA TAILLE, LA FORME ET L'ÉPAISSEUR DE LA ZONE PANORAMIQUE



1. Sélectionnez la **Taille** de la zone panoramique la plus adaptée à la mandibule du patient en cliquant sur le bouton **Taille** correspondant.



2. Sélectionnez la **Forme** de la zone panoramique la plus adaptée à la mandibule du patient en cliquant sur le bouton **Forme** correspondant.



3. Assurez-vous que le mode projection est activé dans la vue **Axial**. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.



4. Sélectionnez l'**Épaisseur** de la zone panoramique en déplaçant le curseur **Épaisseur**. Assurez-vous que la zone panoramique contient l'intégralité des dents des deux mâchoires. Maintenez l'épaisseur aussi faible que possible.

5. Pour enregistrer vos adaptations, cliquez sur **OK**.

- SICAT Function enregistre l'orientation du volume et la zone panoramique adaptées et représente la vue **Panorama** en conséquence.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D en activant la vue souhaitée et en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [► Page 75 - SIDEXIS XG].
- Vous pouvez zoomer des vues. SICAT Function synchronise le zoom entre les vues, sauf la vue **Axial**.
- Pour réinitialiser l'orientation du volume et la zone panoramique, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Pour enregistrer l'orientation actuelle du volume et la zone panoramique actuelle en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer le réglage par défaut**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

24 DONNÉES DE MOUVEMENT

Les mouvements et les positions de la mâchoire propres au patient fournissent des informations sur la dynamique de mastication du patient. Vous pouvez utiliser ces informations pour l'analyse et le diagnostic du patient. En outre, vous pouvez intégrer ces données dans la planification thérapeutique du patient.

SICAT Function visualise les mouvements et les positions de la mâchoire propres au patient. L'application prend en charge les sources suivantes de données de mouvement de la mâchoire :

- Données de mouvement d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire (JMT)
- Positions statiques d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire
- Positions du mordu buccal prises avec une caméra intra-orale

Vous trouverez une liste des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles dans le paragraphe *Appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles* [► Page 105 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez importer les positions du mordu buccal avec les empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Empreintes optiques* [► Page 117 - SIDEXIS XG].

En plus de l'importation des données de mouvement de la mâchoire, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour préparer la représentation de ces données. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Flux de travail standard de SICAT Function* [► Page 32 - SIDEXIS XG].

Une fois toutes les données nécessaires préparées, les actions suivantes relatives aux données de mouvement de la mâchoire sont disponibles :

- *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG]
- *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 131 - SIDEXIS XG]
- *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 132 - SIDEXIS XG]
- *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 133 - SIDEXIS XG]

Précision de la représentation pour les données de mouvement de la mâchoire < 0,6 mm

24.1 APPAREILS D'ACQUISITION DU MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE COMPATIBLES



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination n'est pas appropriée peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination est conforme à l'utilisation des données de mouvement de la mâchoire par SICAT Function.



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire non pris en charge ou d'appareils d'enregistrement non compatibles peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des données de mouvement de la mâchoire qui ont été acquises avec une combinaison supportée d'un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire (par exemple SICAT JMT*) et d'un appareil de recalage compatible (par exemple SICAT Fusion Bite).

Assurez-vous d'acquérir les données de mouvement de la mâchoire uniquement avec un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatible combiné à un appareil de recalage supporté. Importez exclusivement dans SICAT Function des données de mouvement de la mâchoire provenant d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles. Vous pouvez uniquement importer dans SICAT Function des données de mouvement acquises avec des appareils qui prennent en charge le format SICAT JTI, interface V1.0.

SICAT Function supporte actuellement les combinaisons suivantes d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire et d'appareils d'enregistrement :

- SICAT JMT⁺ en combinaison avec un SICAT Fusion Bite, fabricant : SICAT GmbH & Co. KG, Brunnenallee 6, D-53177 Bonn

24.2 IMPORTER ET RECALER DES DONNÉES DE MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE D'APPAREILS DÉDIÉS



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données de mouvement de la mâchoire d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Une acquisition incorrecte des données de mouvement de la mâchoire et des radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que les données de mouvement de la mâchoire et les radiographies 3D ont été acquises conformément aux instructions des fabricants des appareils. Utilisez le type de corps de référence indiqué.



Des données de mouvement de la mâchoire qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données de mouvement de la mâchoire correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données de mouvement de la mâchoire peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données de mouvement de la mâchoire importées.



Une qualité, une précision et une résolution insuffisantes des données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données de mouvement de la mâchoire présentant une qualité, une résolution et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.


ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou une qualité insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec du mécanisme de détection des marqueurs et du corps de référence. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant la détection correcte des marqueurs et du corps de référence.


ATTENTION

Une position, un type et une orientation incorrects du corps de référence peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Après la détection du corps de référence par l'assistant JTM, contrôlez la position, le type et l'orientation corrects du corps de référence en tenant compte des radiographies 3D.


ATTENTION

Un recalage incorrect des données de mouvement de la mâchoire sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données de mouvement de la mâchoire recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

REMARQUE

Afin de garantir le recalage correct des données de mouvement de la mâchoire, SICAT recommande d'utiliser des données de radiographie 3D avec les paramètres suivants :

1. Épaisseur de coupe inférieure à 0,7 mm
2. Taille des voxels inférieure à 0,7 mm dans les trois dimensions



Avant d'importer dans SICAT Function les données de mouvement de la mâchoire acquises, vous devez exporter ces données à partir du logiciel de l'appareil d'acquisition des données de mouvement de la mâchoire. L'exportation de fichiers appropriés pour SICAT Function est décrite dans la notice d'instruction de l'appareil d'acquisition des données de mouvement de la mâchoire.



Si l'étude ouverte contient des données de mouvement de la mâchoire déjà recalées, vous devez confirmer le fait que SICAT Function supprime ces données lorsque vous rouvrez l'assistant **Importer et recaler les données de mouvement de la mâchoire**.



Pendant la procédure d'importation des données de mouvement de la mâchoire, vous devez marquer trois marqueurs sphériques dans la vue **Axial** de l'assistant **Importer et recaler les données de mouvement de la mâchoire**, afin que SICAT Function puisse les détecter ensuite.


Vous trouverez des informations générales sur les données de mouvement de la mâchoire dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 104 - SIDEXIS XG].

Procédez de la manière suivante pour importer et recaler des données de mouvement de la mâchoire :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 53 - SIDEXIS XG].




1. Cliquez sur l'icône **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Dans l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - ▶ La fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** s'ouvre.
3. Sélectionnez dans la fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** le fichier des données de mouvement de la mâchoire désiré puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - ▶ La fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** se ferme et SICAT Function reporte le chemin du fichier des données de mouvement de la mâchoire désiré dans le champ **Chemin**.
 - ▶ La vue **Fourchette occlusale** affiche un aperçu de la fourchette occlusale qui a été utilisée pendant l'acquisition des données de mouvement de la mâchoire.
 - ▶ La zone **Patient** et la zone **Acquisition** affichent des informations du fichier des données de mouvement de la mâchoire :

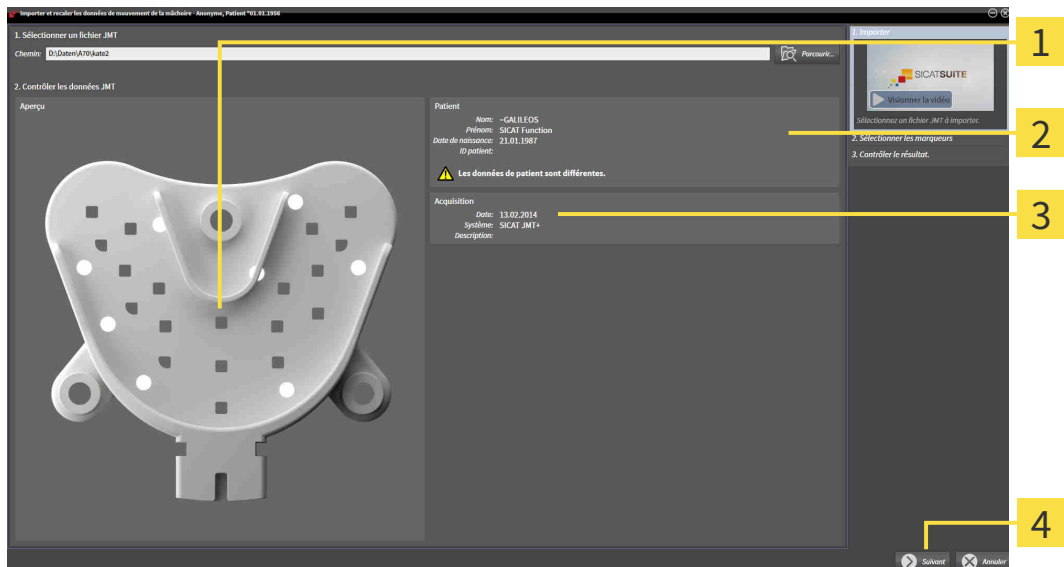

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Vue SICAT Fusion Bite | 3 Zone Acquisition |
| 2 Zone Patient | 4 Bouton Suivant |

4. Assurez-vous que le fichier des données de mouvement de la mâchoire correspond bien à l'étude active.
5. Cliquez sur **Suivant**.

► L'étape **Sélectionner les marqueurs** s'ouvre :

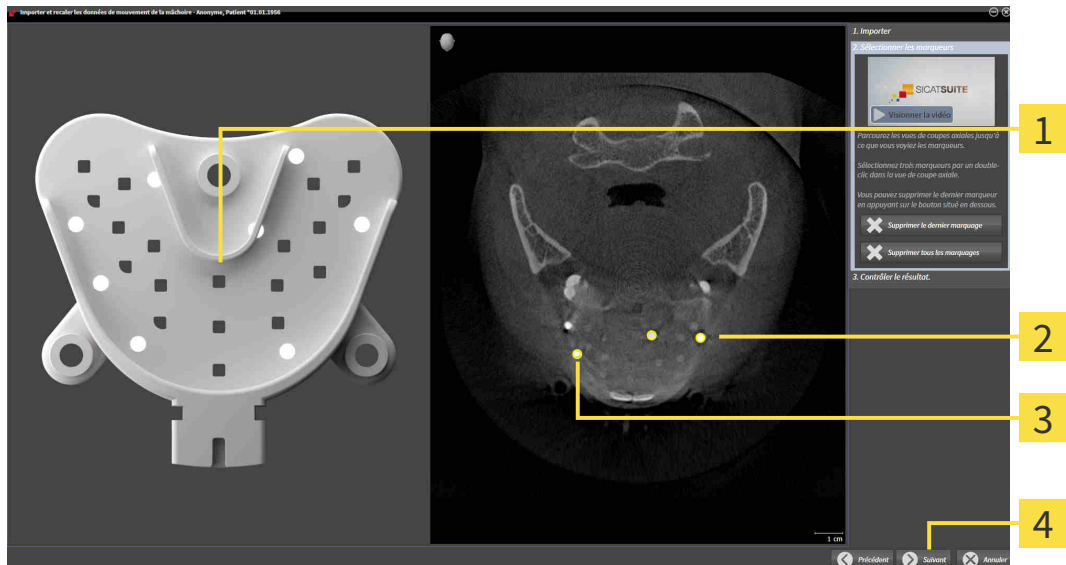

1 Fourchette occlusale-Vue


3 Marquage sélectionné

2 Axial-Vue

4 Bouton **Suivant**

6. Naviguez dans les coupes axiales jusqu'à ce que la vue de coupe **Axial** affiche au moins un marqueur sphérique.
7. Dans la vue de coupe **Axial**, double-cliquez sur un marqueur sphérique.
 - SICAT Function marque le marqueur sphérique.
8. Répétez la dernière étape jusqu'à ce que trois marqueurs sphériques soient marqués.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 - SICAT Function enregistre les données de mouvement de la mâchoire.

► L'étape **Contrôler le résultat** s'ouvre :

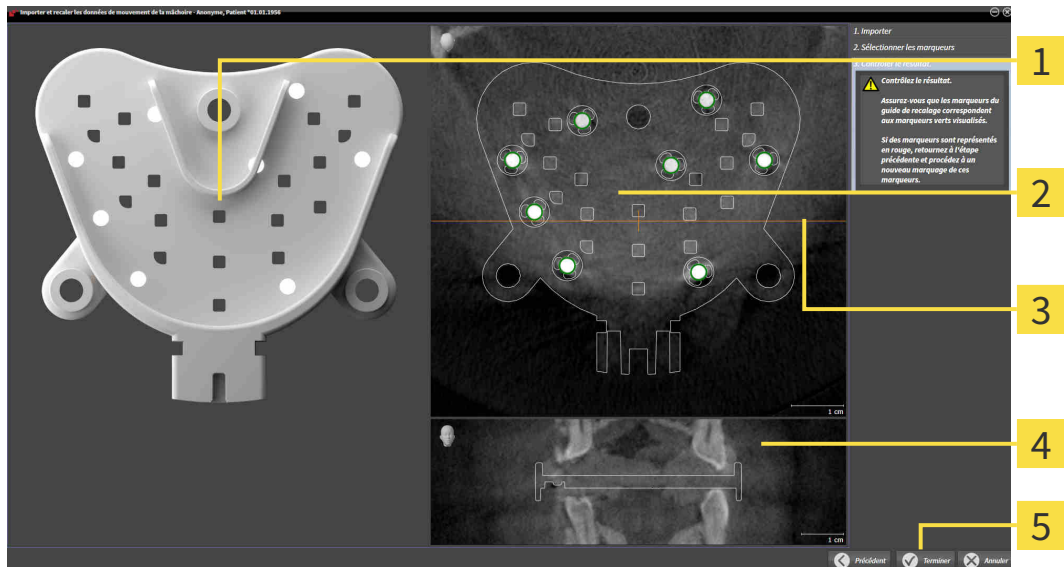

1 Fourchette occlusale-Vue

4 Coronal-Vue

2 Axial-Vue de coupe

5 Bouton **Terminer**

3 Ligne de référence coronale

10. Assurez-vous que les marqueurs sphériques sur la **Fourchette occlusale** et dans la vue de coupe **Axial** coïncident.

11. Assurez-vous dans la vue **Coronal** que SICAT Function a correctement détecté la position de la fourchette occlusale. Déplacez la ligne de référence coronale dans la vue **Axial** ou naviguez à travers les coupes dans la vue **Coronal**.

12. Cliquez sur **Terminer**.

► SICAT Function importe les données de mouvement de la mâchoire enregistrée.

► L'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** se ferme.

► SICAT Function affiche un objet **Données de mouvement** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [► Page 59 - SIDEXIS XG].



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** :

- Si vous n'êtes pas satisfait du dernier marqueur, vous pouvez cliquer sur le bouton **Supprimer le dernier marquage**.
- Si la **Fourchette occlusale** n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Sélectionner les marqueurs** avec des marqueurs placés en d'autres positions.
- Si vous voulez annuler l'importation et le recalage des données de mouvement de la mâchoire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

25 SEGMENTATION



Des artefacts excessifs ou une résolution insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec de la procédure de segmentation ou des résultats insuffisants. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant une qualité suffisante de la segmentation des structures anatomiques concernées.



Une qualité insuffisante de la segmentation peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez que la qualité de la segmentation est suffisante pour l'utilisation prévue.

Pour représenter le mouvement de la mandibule, vous devez définir la limite entre la mandibule et l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle la segmentation. L'assistant **Segmentation de la mandibule** vous permet de segmenter non seulement la mandibule, mais aussi les fosses du patient. Dans SICAT Function, la segmentation est une procédure semi-automatique.

Procédure semi-automatique signifie que vous devez marquer manuellement des parties de la mandibule et des fosses à l'aide des outils de dessin dans l'assistant **Segmentation de la mandibule**. Après un marquage, l'assistant de segmentation calcule automatiquement des parties similaires.

Les actions suivantes sont disponibles pour la segmentation de la mandibule et des fosses :

- *Segmenter la mandibule* [► Page 112 - SIDEXIS XG]
- *Segmenter les fosses* [► Page 114 - SIDEXIS XG]

Après la segmentation de la mandibule, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Visualiser et visionner des mouvements anatomiques individuels du patient dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].
- Visualiser des tracés de mouvements anatomiques individuels du patient dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 131 - SIDEXIS XG].
- Visualisation des articulations temporo-mandibulaires en mouvement dans l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 134 - SIDEXIS XG].

25.1 SEGMENTER LA MANDIBULE



À chaque démarrage, l'assistant **Segmenter la mandibule et les condyles** effectue un calcul préliminaire de la segmentation. La durée de ce calcul dépend des performances de votre ordinateur.



La segmentation de SICAT Function utilise des régions au lieu de contours anatomiques. Par conséquent, il ne vous est que rarement nécessaire de redessiner des contours anatomique avec exactitude. À la place, marquez des régions contigües en plaçant des traits dans les régions.

Vous trouverez des informations générales sur la segmentation dans *Segmentation* [► Page 111 - *SIDEXIS XG*].


Procédez de la manière suivante pour segmenter la mandibule :

- ☑ L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 53 - *SIDEXIS XG*].



1. Cliquez sur l'icône **Segmenter la mandibule et les condyles**.

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** s'ouvre :

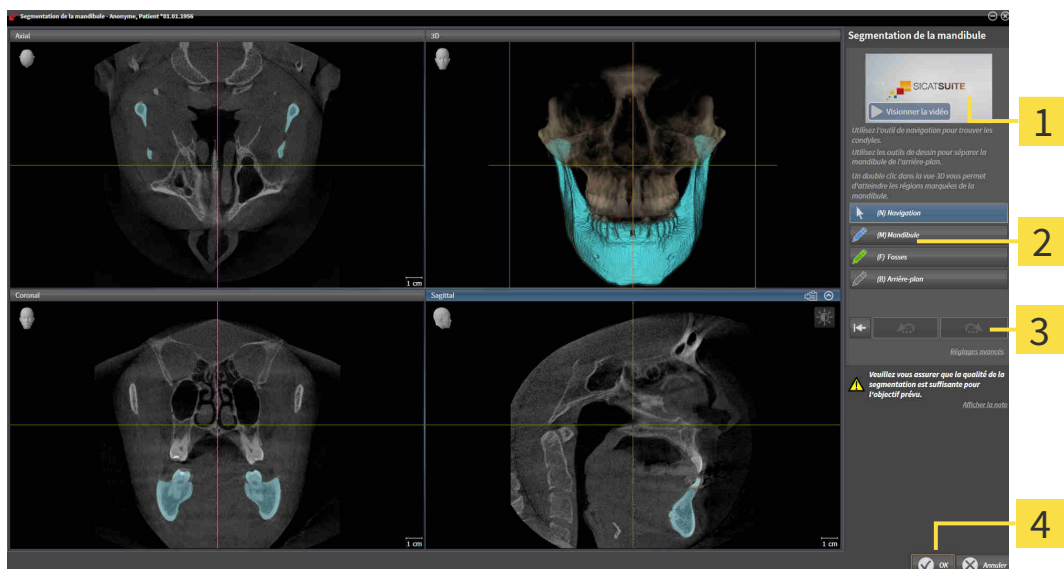

1 Exemple de vidéo

3 Bouton **Réinitialiser**, bouton **Annuler** et bouton **Répéter**

2 Zone **Outils de dessin**

4 Bouton **OK**

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** effectue un calcul préliminaire de la segmentation.

2. Adaptez la vue **Axial**, la vue **Coronal**, ou la vue **Sagittal** de manière à ce que la mandibule et les fosses soient visibles.



3. Cliquez sur le bouton **Mandibule**.

4. Amenez le pointeur de la souris sur la mandibule dans la vue de coupe 2D de votre choix.

► Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un crayon.

5. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.

6. Suivez la région interne de la mandibule avec le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente votre marquage à l'aide d'une ligne bleue.
7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function segmente la mandibule en fonction de votre marquage.
8. Si vous voulez ajouter des régions supplémentaires à la mandibule, cliquez sur l'icône **Navigation**, naviguez dans une vue 2D jusqu'aux structures voulues et marquez-les comme décrit précédemment.
9. Si la segmentation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton **OK**.
 - ▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** se ferme.
 - ▶ SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [▶ Page 59 - SIDEXIS XG].
 - ▶ La vue **3D** représente le résultat de la segmentation.



Vous pouvez utiliser l'outil de dessin **Arrière-plan**, soit pour marquer des régions comme arrière-plan, soit pour corriger des régions trop grandes de la segmentation semi-automatique.

Vous pouvez également poursuivre la segmentation ou l'améliorer ultérieurement.



Vous pouvez naviguer dans les vues de coupes 2D en commutant sur le mode **Navigation**.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles** :

- Des raccourcis clavier spéciaux sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Raccourcis clavier* [▶ Page 192 - SIDEXIS XG].
- Si vous double-cliquez dans la vue **3D** sur une position appartenant à la région segmentée, toutes les vues de coupe 2D visualisent la coupe correspondante. De plus, SICAT Function centre les réticules sur cette position. Utilisez cette aide à la navigation par exemple pour corriger des régions discontinues ou fermer des trous.
- Si la segmentation ne correspond pas aux particularités anatomiques, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.
- Si vous voulez restaurer une opération annulée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Répéter**.
- Pour annuler toutes les étapes de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Dans de rares cas, il peut arriver que le calcul préliminaire du jeu de données ne fournisse pas un résultat optimal. Dans un tel cas, vous pouvez cliquer sur **Réglages avancés** et décocher la case **Détecter automatiquement l'arrière-plan**. À l'aide de l'outil de dessin **Arrière-plan**, vous pouvez ensuite marquer les régions qui ne font pas partie de l'os mandibulaire ou des fosses avec au moins un trait.
- Si vous voulez annuler la segmentation des condyles et de la région mandibulaire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.



25.2 SEGMENTER LES FOSSES

Depuis l'introduction de l'espace de travail **TMJ**, la segmentation des fosses n'est plus absolument nécessaire, dans la plupart des cas. Utilisez l'espace de travail **TMJ** pour évaluer la relation dynamique condyle-fosse sans segmentation.



À chaque démarrage, l'assistant **Segmenter la mandibule et les condyles** effectue un calcul préliminaire de la segmentation. La durée de ce calcul dépend des performances de votre ordinateur.



La segmentation de SICAT Function utilise des régions au lieu de contours anatomiques. Par conséquent, il ne vous est que rarement nécessaire de redessiner des contours anatomique avec exactitude. À la place, marquez des régions contigües en plaçant des traits dans les régions.

Vous trouverez des informations générales sur la segmentation dans *Segmentation* [► Page 111 - *SIDEXIS XG*].


Procédez de la manière suivante pour segmenter les fosses :

- ☑ L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 53 - *SIDEXIS XG*].



1. Cliquez sur l'icône **Segmenter la mandibule et les condyles**.

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** s'ouvre :

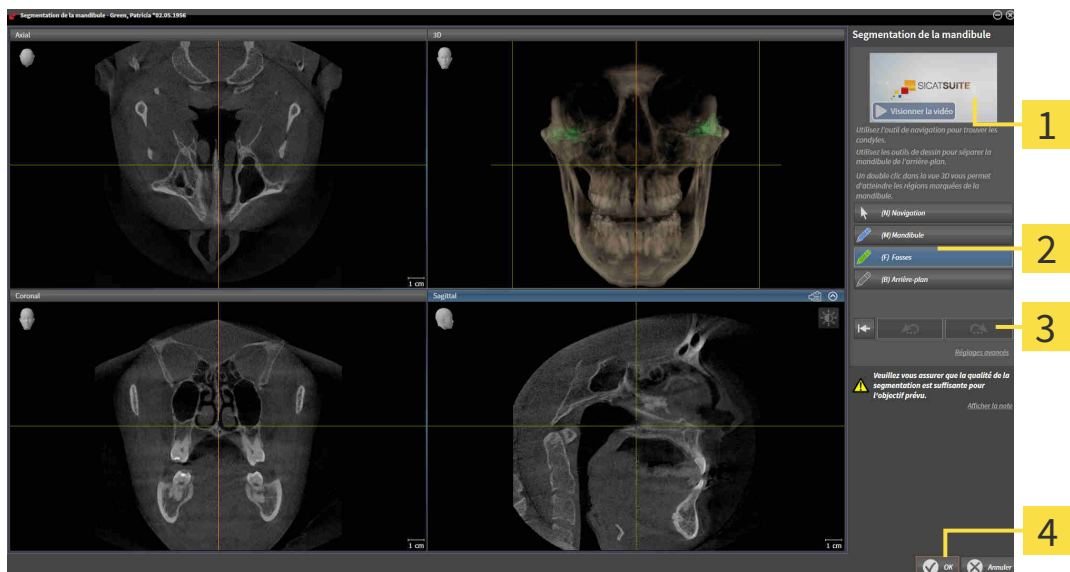

1 Exemple de vidéo

3 Bouton **Réinitialiser**, bouton **Annuler** et bouton **Répéter**

2 Zone **Outils de dessin**

4 Bouton **OK**

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** effectue un calcul préliminaire de la segmentation.

2. Adaptez la vue **Axial**, la vue **Coronal**, ou la vue **Sagittal** de manière à ce que la mandibule et les fosses soient visibles.



3. Cliquez sur le bouton **Fosses**.

4. Amenez le pointeur de la souris sur les fosses dans la vue de coupe 2D de votre choix.

- ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un crayon.
- 5. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
- 6. Suivez la région interne des fosses avec le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente votre marquage à l'aide d'une ligne verte.
- 7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function segmente les fosses en fonction de votre marquage.
- 8. Si vous voulez ajouter des régions supplémentaires aux fosses, cliquez sur l'icône **Navigation**, naviguez dans une vue 2D jusqu'aux structures voulues et marquez-les comme décrit précédemment.
- 9. Si la segmentation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton **OK**.
 - ▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** se ferme.
 - ▶ SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [▶ Page 59 - SIDEXIS XG].
 - ▶ La vue **3D** représente le résultat de la segmentation.



Vous pouvez utiliser l'outil de dessin **Arrière-plan**, soit pour marquer des régions comme arrière-plan, soit pour corriger des régions trop grandes de la segmentation semi-automatique.

Vous pouvez également poursuivre la segmentation ou l'améliorer ultérieurement.



Vous pouvez naviguer dans les vues de coupes 2D en commutant sur le mode **Navigation**.



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles** :

- Des raccourcis clavier spéciaux sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Raccourcis clavier* [▶ Page 192 - SIDEXIS XG].
- Si vous double-cliquez dans la vue **3D** sur une position appartenant à la région segmentée, toutes les vues de coupe 2D visualisent la coupe correspondante. De plus, SICAT Function centre les réticules sur cette position. Utilisez cette aide à la navigation par exemple pour corriger des régions discontinues ou fermer des trous.
- Si la segmentation ne correspond pas aux particularités anatomiques, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.
- Si vous voulez restaurer une opération annulée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Répéter**.
- Pour annuler toutes les étapes de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Dans de rares cas, il peut arriver que le calcul préliminaire du jeu de données ne fournisse pas un résultat optimal. Dans un tel cas, vous pouvez cliquer sur **Réglages avancés** et décocher la case **Détecter automatiquement l'arrière-plan**. À l'aide de l'outil de dessin **Arrière-plan**, vous pouvez ensuite marquer les régions qui ne font pas partie de l'os mandibulaire ou des fosses avec au moins un trait.
- Si vous voulez annuler la segmentation des condyles et de la région mandibulaire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

26 EMPREINTES OPTIQUES



Vous pouvez uniquement importer et recalcr des empreintes optiques pour des données de radiographies créées par des appareils de radiographie 3D de Sirona.

SICAT Function peut représenter simultanément des données de radiographie et des empreintes optiques coordonnées du même patient. La représentation combinée apporte des informations supplémentaires pour l'analyse et le diagnostic. En outre, la mise en œuvre thérapeutique est basée sur les empreintes optiques.

Les actions suivantes sont nécessaires pour utiliser des données d'empreintes optiques dans SICAT Function :

- Importation d'un fichier d'empreintes optiques (composé d'une empreinte de la mandibule et d'une empreinte du maxillaire) contenant des empreintes optiques d'un système de prise d'empreinte tel que CEREC avec une licence Open GALILEOS.
- Recalage d'empreintes optiques sur les données de radiographie

SICAT Function prend en charge les formats de fichiers d'empreintes optiques suivants :

- Fichiers SIXD contenant une empreinte optique du maxillaire et une empreinte optique de la mandibule
- Fichiers SSI contenant une empreinte optique du maxillaire et une empreinte optique de la mandibule
- Les fichiers STL qui contiennent une empreinte optique des maxillaires ou une empreinte optique des mandibules (licence **SICAT Suite STL Import** nécessaire)

Les outils suivants sont disponibles pour les empreintes optiques :

- *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG]
- *Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT* [► Page 125 - SIDEXIS XG]
- *Activer, masquer et afficher des empreintes optiques* - vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 56 - SIDEXIS XG].
- *Focaliser les empreintes optiques et supprimer les empreintes optiques* - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 58 - SIDEXIS XG].

Les empreintes optiques en format STL nécessitent une étape supplémentaire à l'importation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Étapes supplémentaires pour les empreintes optiques en format STL*. [► Page 124 - SIDEXIS XG].

26.1 IMPORTER ET RECALER LES EMPREINTES OPTIQUES


ATTENTION

L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.


ATTENTION

Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.


ATTENTION

Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.


ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.


ATTENTION

Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.


ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou des points manquants pour le recalage peuvent entraîner l'échec de la procédure de recalage d'empreintes optiques. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des empreintes optiques et des radiographies 3D permettant un recalage précis.


ATTENTION

La sélection, dans le procédé de recalage d'empreintes optiques, de marquages qui ne coïncident pas peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Lorsque vous recalez des données d'empreintes optiques, sélectionnez soigneusement, dans les radiographies 3D et dans les empreintes optiques, des marquages qui coïncident.

**ATTENTION****Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.**

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** indique toujours les données patient et ignore le réglage **Anonymiser** afin que vous puissiez contrôler si les données de radiographie 3D et les empreintes optiques correspondent.



Vous pouvez utiliser la **Fenêtre d'examen** pour vérifier qu'une empreinte optique est orientée avec précision par rapport aux données de radiographie. Vous pouvez décaler la **Fenêtre d'examen** et naviguer à travers les coupes dans la **Fenêtre d'examen**.

Vous trouverez des informations générales sur les empreintes optiques dans *Empreintes optiques* [► Page 117 - SIDEXIS XG].


Procédez de la manière suivante pour importer et recaler des empreintes optiques :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.



1. Cliquez sur l'icône **Importer et recaler les empreintes optiques**.
 - L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** s'ouvre.
3. Sélectionnez dans la fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** le fichier des données d'empreinte optique désiré, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - La fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** se ferme.


► SICAT Function ouvre le fichier d'empreintes optiques sélectionné :

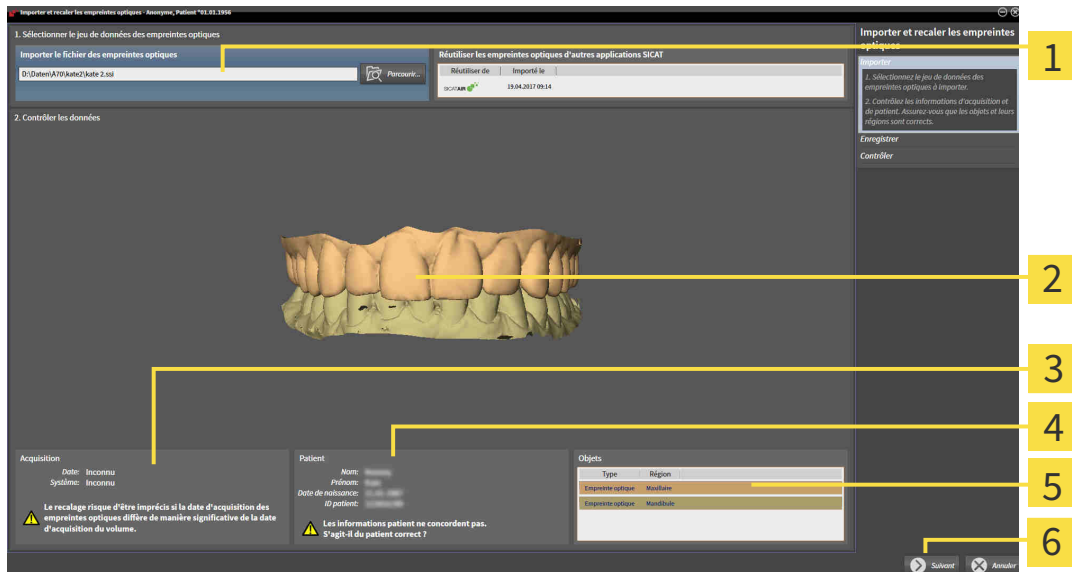

- 1** Zone **Importer le fichier des empreintes optiques**
- 2** **3D**Vue des empreintes optiques
- 3** Informations sur l'acquisition
- 4** Informations sur les patients
- 5** Liste d'objets
- 6** Bouton **Suivant**


- 4. Vérifiez les informations relatives à l'acquisition et au patient.
- 5. Assurez-vous que les objets et leurs régions sont corrects. La couleur de fond dans la liste d'objets correspond à la couleur des objets dans la vue **3D**.
- 6. Cliquez sur **Suivant**.

- ▶ Si les données patient sont différentes dans la radiographie 3D et dans l’empreinte optique, SICAT Function ouvre la fenêtre **Informations patient différentes**:

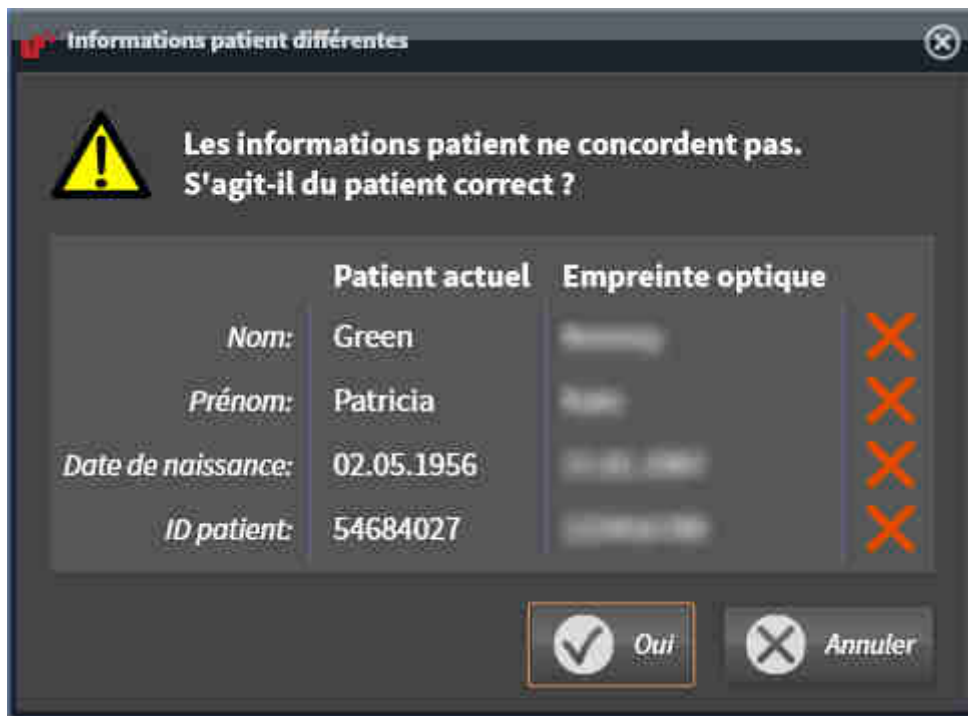


7. Comparez les informations patient. Si vous êtes certain(e) que l’empreinte optique correspond au patient actuel, appuyez sur le bouton **Oui**.

- ▶ L’étape **Enregistrer** s’ouvre pour la première empreinte optique :

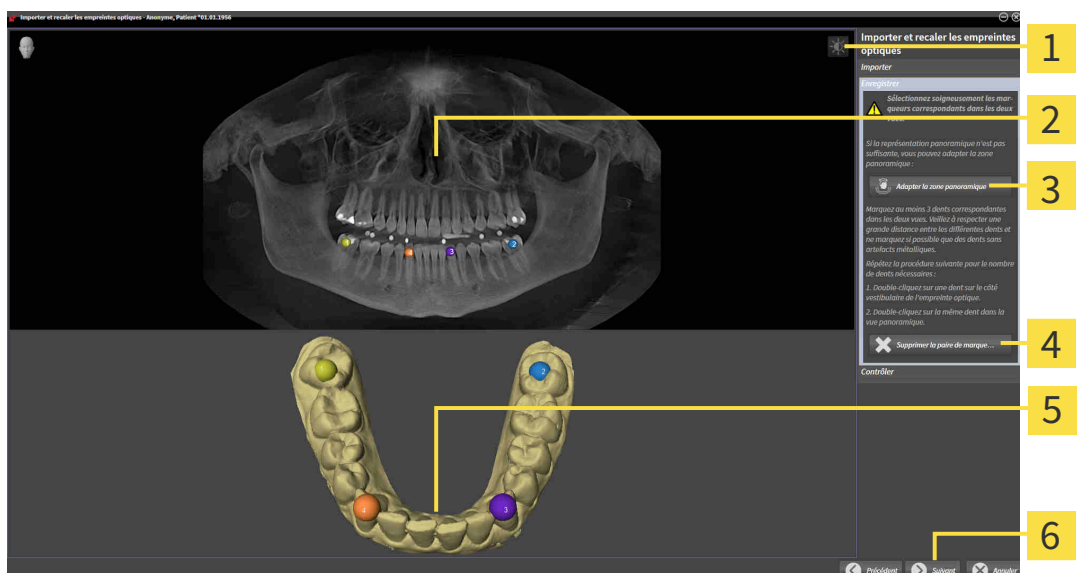

- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Adapter le contraste et la luminosité | 4 Bouton Supprimer la paire de marqueurs active |
| 2 Panorama -Vue | 5 3D Vue représentant la première empreinte optique |
| 3 Bouton Adapter la zone panoramique | 6 Bouton Suivant |

8. Pour la première empreinte optique, double-cliquez sur une même dent dans la vue **Panorama** et dans la vue **3D**, sur le côté vestibulaire de l'empreinte optique. Veillez à respecter une grande distance entre les différentes dents et ne marquez que des dents sans artefacts métalliques. Répétez cette étape jusqu'à avoir marqué au moins trois dents correspondantes dans les deux vues.
 - ▶ Les marquages avec différentes couleurs et numéros dans les deux vues représentent les dents correspondantes de la première empreinte optique.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 - ▶ SICAT Function calcule le recalage de la première empreinte optique sur les données de radiographie.
 - ▶ L'étape **Contrôler** s'ouvre pour la première empreinte optique :

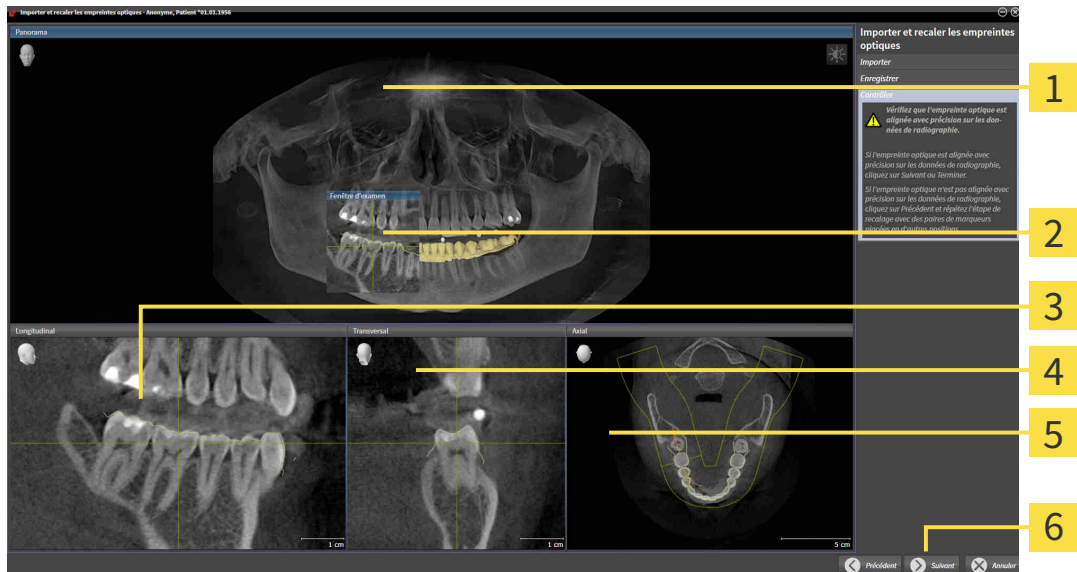

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 4 Transversal-Vue |
| 2 Fenêtre d'examen | 5 Axial-Vue |
| 3 Longitudinal-Vue | 6 Bouton Suivant |

10. Vérifiez dans les vues de coupe 2D que l'empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie. Naviguez à travers les coupes et contrôlez les contours représentés.
11. Si l'empreinte optique n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Enregistrer** avec des paires de marqueurs placées en d'autres positions.
12. Si la première empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - ▶ L'étape **Enregistrer** s'ouvre pour la deuxième empreinte optique.
13. Pour la deuxième empreinte optique, double-cliquez sur une même dent dans la vue **Panorama** et dans la vue **3D**, sur le côté vestibulaire de l'empreinte optique. Veillez à respecter une grande distance entre les différentes dents et ne marquez si possible que des dents sans artefacts métalliques. Répétez cette étape jusqu'à avoir marqué au moins trois dents correspondantes dans les deux vues. Vous pouvez augmenter la précision du recalage en marquant jusqu'à cinq dents.
 - ▶ Les marquages avec différentes couleurs et numéros dans les deux vues représentent les dents correspondantes de la deuxième empreinte optique.

14. Cliquez sur **Suivant**.
 - ▶ SICAT Function calcule le recalage de la deuxième empreinte optique sur les données de radiographie.
 - ▶ L'étape **Contrôler** s'ouvre pour la deuxième empreinte optique.
15. Vérifiez dans les vues de coupe 2D que l'empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie. Naviguez à travers les coupes et contrôlez les contours représentés.
16. Si l'empreinte optique n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Enregistrer** avec des paires de marqueurs placées en d'autres positions. Vous pouvez augmenter la précision du recalage en marquant jusqu'à cinq dents.
17. Si la deuxième empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Terminer**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalage des empreintes optiques** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ajoute les empreintes optiques sélectionnées au **Navigateur d'objets**.
 - ▶ SICAT Function affiche les empreintes optiques recalées.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans l'assistant **Importer et recalage des empreintes optiques** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D, en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 75 - SIDEXIS XG].
- Vous pouvez adapter la zone panoramique en cliquant sur l'icône **Adapter la zone panoramique**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter la zone panoramique* [▶ Page 101 - SIDEXIS XG].
- Si vous voulez supprimer une paire de marqueurs à l'étape **Enregistrer**, vous pouvez sélectionner un marqueur de la paire et cliquer sur le bouton **Supprimer la paire de marqueurs active**.
- Si vous voulez annuler l'importation et le recalage d'empreintes optiques, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.


26.2 ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES EMPREINTES OPTIQUES EN FORMAT STL.

Les fichiers STL ne contiennent aucune information sur la position et l'orientation d'empreintes optiques. C'est pourquoi, vous devez adapter la position et l'orientation si nécessaire :

Vous avez déjà activé une licence **SICAT Suite Importation STL**.

1. Ouvrez en format STL les empreintes optiques d'un fichier. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG].

► La fenêtre **Assistant d'importation STL** s'ouvre :

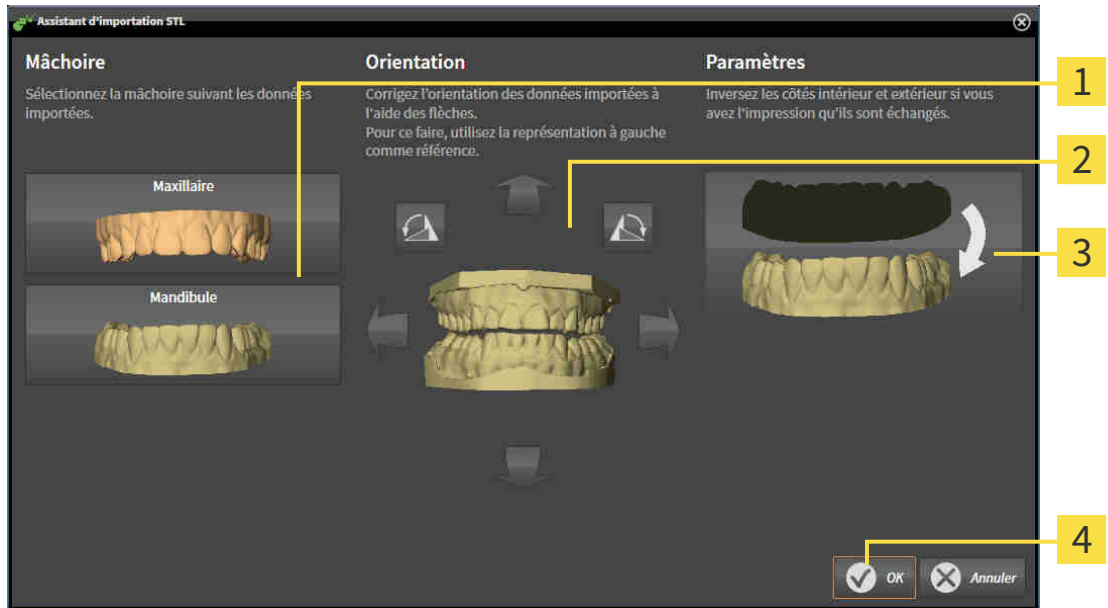

1 Sélection de la mâchoire

3 Inversement des côtés intérieur et extérieur

2 Changement d'orientation

4 Bouton **OK**

2. Sélectionnez dans la zone **Mâchoire**, si l'empreinte optique contient le **maxillaire** ou de la **mandibule**, en cliquant sur le symbole correspondant.



3. Si nécessaire, changez l'orientation des empreintes optiques par rapport au pré-positionnement approximatif en cliquant sur les symboles de flèches ou sur les symboles de rotation dans l'espace **Orientation**.
4. Si nécessaire, inversez les côtés intérieur et extérieur des empreintes optiques en cliquant sur la représentation des empreintes optiques dans l'espace **Paramètres**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.
6. Si nécessaire, répétez les étapes pour un deuxième fichier STL. SICAT Function affecte automatiquement le deuxième fichier STL à l'autre mâchoire respective.
 - SICAT Function affiche les empreintes optiques importées dans l'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques**.

7. Poursuivez avec l'enregistrement des empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG].

26.3 RÉUTILISER LES EMPREINTES OPTIQUES D'AUTRES APPLICATIONS SICAT



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.



Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** indique toujours les données patient et ignore le réglage **Anonymiser** afin que vous puissiez contrôler si les données de radiographie 3D et les empreintes optiques correspondent.


Vous trouverez des informations générales sur les empreintes optiques dans *Empreintes optiques* [► Page 117 - SIDEXIS XG].

Procédez de la manière suivante pour réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.

☑ Vous avez déjà importé des empreinte optiques concernant l'étude ouverte dans une autre application SICAT et vous n'utilisez pas encore ces empreintes optiques dans SICAT Function.

1. Cliquez sur l'icône **Importer et recaler les empreintes optiques**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Cliquez dans la zone **Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT** sur la ligne représentant les empreintes optiques souhaitées.
3. SICAT Function affiche les empreintes optiques sélectionnées :

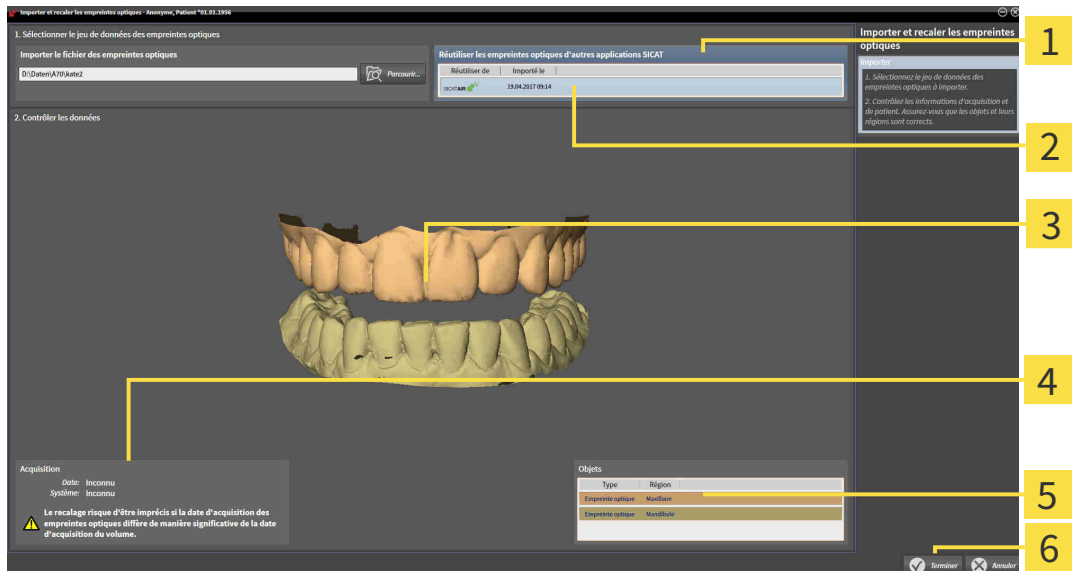

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zone Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT</p> <p>2 Liste des empreintes optiques d'autres applications SICAT</p> <p>3 3DVue des empreintes optiques</p> | <p>4 Informations sur l'acquisition</p> <p>5 Liste d'objets</p> <p>6 Bouton Terminer</p> |
|---|--|

4. Vérifiez les informations relatives à l'acquisition et au patient. Assurez-vous que les objets et leurs régions sont corrects. La couleur de fond dans la liste d'objets correspond à la couleur des objets dans la vue **3D**.

5. Cliquez sur le bouton **Terminer**.

- ▶ L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** se ferme.
- ▶ SICAT Function ajoute les empreintes optiques sélectionnées au **Navigateur d'objets**.
- ▶ SICAT Function affiche les empreintes optiques sélectionnées.

Pour annuler la reprise d'empreintes optiques d'autres applications SICAT, vous pouvez cliquer sur **Anuler**.

27 ARTICULATION ANATOMIQUE

SICAT Function visualise l'articulation anatomique d'un patient grâce au fusionnement, par le logiciel, des données de radiographie 3D et des données d'un appareil de mesure du mouvement de la mâchoire. C'est ce que l'on appelle articulation anatomique. Après avoir segmenté la mandibule, vous pouvez suivre tous les mouvements du patient jusque dans les articulations temporo-mandibulaires.

SICAT Function a besoin des données suivantes pour l'articulation anatomique :

- Données de radiographie 3D segmentées - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Segmentation* [► Page 111 - SIDEXIS XG].
- Données recalées du mouvement de la mâchoire - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 104 - SIDEXIS XG].

SICAT Function peut utiliser des empreintes optiques comme source d'informations supplémentaire. Les empreintes optiques vous permettent par exemple d'analyser les mouvements de la mâchoire d'un patient avant l'occlusion finale. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Empreintes optiques* [► Page 117 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez examiner les mouvements individuels d'un patient à l'aide des outils suivants :

- Espace JMT - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG]. Vous pouvez utiliser les boutons de lecture dans la zone JMT pour visionner le mouvement individuel de la mandibule d'un patient dans la vue **3D**. Un bouton de la zone JMT vous permet en outre d'exporter les données de mouvement de la mâchoire.
- **3DVue** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - SIDEXIS XG].
- **Fenêtre d'examen** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 80 - SIDEXIS XG].


Pour analyser les mouvements individuels de la mandibule d'un patient, vous pouvez placer le réticule avec un double clic dans une vue de coupe 2D, à la position choisie sur la mandibule. SICAT Function affiche ensuite le tracé de mouvement correspondant à la position choisie dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [► Page 79 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez aussi placer la **Fenêtre d'examen** à la position choisie sur la mandibule. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 131 - SIDEXIS XG].

Dans la vue **3D**, SICAT Function indique à l'aide de différentes couleurs si la position choisie se trouve sur la mandibule segmentée ou en dehors. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 132 - SIDEXIS XG] et *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 133 - SIDEXIS XG].

27.1 INTERAGIR AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE

La zone JMT est disponible dans SICAT Function pour la gestion des mouvements de la mâchoire :

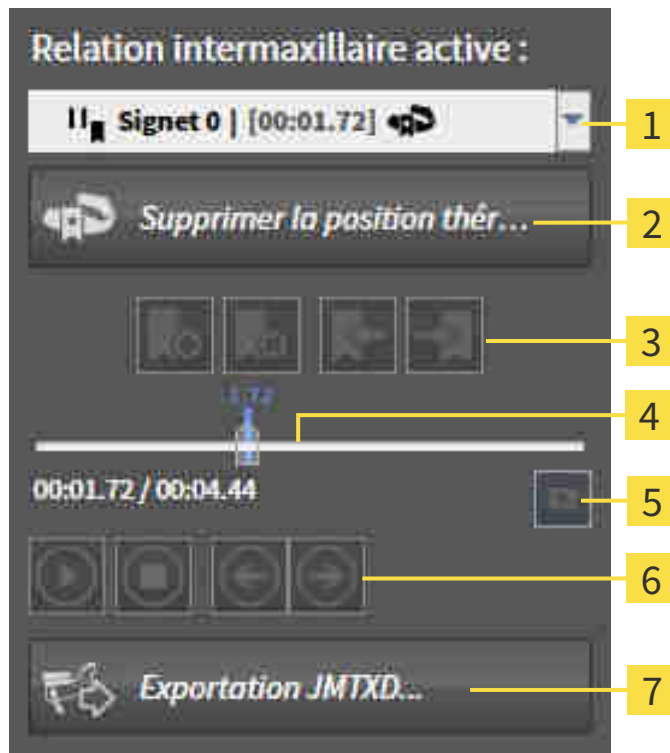

1 Liste **Relation intermaxillaire active**

5 Symbole **Commuter le mode de lecture**

2 Bouton **Position thérapeutique**

6 Boutons de lecture

3 Boutons de signet

7 Bouton **Exportation JMTXD**


4 Axe du temps avec curseur

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans la zone JMT :

- Sélectionner les relations intermaxillaires statiques ou les mouvements de la mâchoire.
- Interagir avec les mouvements de la mâchoire.
- Gérer les signets.
- Définir une position thérapeutique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [► Page 160 - SIDEXIS XG].
- Exporter les données de mouvement de la mâchoire.

SÉLECTIONNER LES RELATIONS INTERMAXILLAIRES STATIQUES OU LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE.






Procédez de la manière suivante pour sélectionner une **Relation intermaxillaire statique** ou une **Relation intermaxillaire dynamique** :

1. Cliquez sur la liste **Relation intermaxillaire active** .
 - ▶ La liste **Relation intermaxillaire active** s'ouvre.
- 
 2. Choisissez la **Relation intermaxillaire statique** ou la **Relation intermaxillaire dynamique** souhaitée.
 - ▶ La liste **Relation intermaxillaire active** se ferme.
 - ▶ La zone JMT affiche la désignation de la relation intermaxillaire sélectionnée.
 - ▶ La vue **3D** représente la relation intermaxillaire sélectionnée.

INTERAGIR AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE

Procédez de la manière suivante pour interagir avec les mouvements de la mâchoire :

- Les données de mouvement de la mâchoire ont déjà été importées. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalculer des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [▶Page 106 - SIDEXIS XG].

- 
 1. Pour démarrer la lecture, cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 
 2. Pour arrêter la lecture, cliquez sur l'icône **Arrêter**.
- 
 3. Pour sauter à la trame suivante, cliquez sur l'icône **En avant**.
- 
 4. Pour sauter à la trame précédente, cliquez sur l'icône **En arrière**.
- 
 5. Pour commuter le mode de lecture entre "une fois" et "en boucle", cliquez sur l'icône **Commuter le mode de lecture**.
6. Pour modifier manuellement la position sur l'axe du temps, cliquez sur le curseur dans la zone JMT, déplacez la souris et relâchez le bouton gauche de la souris à la position voulue.

GÉRER LES SIGNETS DANS LA ZONE JMT

Procédez de la manière suivante pour gérer les signets dans la zone JMT :



1. Pour ajouter un signet à la position actuelle sur l'axe du temps, cliquez sur l'icône **Ajouter un signet**.



2. Pour supprimer un signet à la position actuelle sur l'axe du temps, cliquez sur l'icône **Supprimer le signet**.



3. Pour déplacer le curseur à la position du signet suivant, cliquez sur l'icône **Signet suivant**.



4. Pour déplacer le curseur à la position du signet précédent, cliquez sur l'icône **Signet précédent**.

Dans les cas suivants, il n'est pas possible de supprimer un signet :

- Vous avez défini un signet sur une position thérapeutique pour laquelle une commande se trouve dans le panier. Pour supprimer le signet, terminez la commande ou supprimez-la.
- Vous avez sélectionné un signet en tant que relation intermaxillaire active. Pour supprimer le signet, sélectionnez le tracé de mouvement correspondant ou la relation intermaxillaire statique correspondante et cliquez sur l'icône **Signet suivant**.

EXPORTER LES DONNÉES DE MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE

Procédez de la manière suivante pour exporter les données de mouvement de la mâchoire :

- Vous avez déjà importé et recalé des données de mouvement de la mâchoire.
- Vous avez déjà importé et recalé des empreintes optiques du maxillaire et de la mandibule.



1. Cliquez sur le bouton **Exportation JMTXD**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
2. Sélectionnez un répertoire de destination et modifiez le nom du fichier si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - ▶ SICAT Function ferme la fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows.
 - ▶ SICAT Function exporte les données de mouvement de la mâchoire et les empreintes optiques dans le fichier spécifié (format de fichier JMTXD, compatibilité avec CEREC 4.4 et InLab15).



Vous pouvez exporter les données de mouvement de la mâchoire sous forme anonyme en activant auparavant l'anonymisation dans les réglages.

27.2 REPRÉSENTATION DE TRACÉS DE MOUVEMENTS DANS LA VUE 3D

Les tracés de mouvements représentent la trajectoire dans l'espace d'un point de la mandibule. Ils sont semblables à la représentation des systèmes de condylographie rapportée aux axes usuels. Le point dont la trajectoire est représentée est appelé point de tracé. Vous pouvez choisir librement des points de tracé dans SICAT Function. Vous pouvez sélectionner des mouvements individuels d'un patient dans la zone JMT et les examiner dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace JMT dans *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].

Pour représenter les tracés de mouvements dans la vue **3D**, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Recalez les données de mouvement de la mâchoire sur les données de radiographies 3D - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 104 - SIDEXIS XG].
- Segmentez les données de radiographie 3D - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Segmentation* [► Page 111 - SIDEXIS XG].

Une fois que vous avez importé les données de mouvement de la mâchoire et segmenté les données de radiographie 3D, la vue **3D** affiche d'abord les relations originelles de la radiographie 3D. Si vous sélectionnez un mouvement enregistré, la vue **3D** affiche les tracés de mouvements.

SICAT Function marque la position des tracés de mouvements à l'aide de différentes couleurs :

- Si les tracés de mouvement se trouvent sur la mandibule du patient, SICAT Function les repère en vert.
- Si les tracés de mouvement ne se trouvent pas sur la mandibule du patient, SICAT Function les repère en rouge.

Vous pouvez placer les tracés de mouvement sur la mandibule du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 132 - SIDEXIS XG] et *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 133 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez sélectionner un type de représentation pour la vue **3D** et l'adapter à vos besoins. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [► Page 84 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez visualiser la relation entre trois points de tracé différents. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utilisation du triangle de Bonwill* [► Page 137 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez afficher et masquer la limite de la segmentation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher la limite de la segmentation* [► Page 138 - SIDEXIS XG].

Vous pouvez visualiser le mouvement autour du condyle. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [► Page 139 - SIDEXIS XG].

27.3 ADAPTER LES TRACÉS DE MOUVEMENTS AVEC LA FENÊTRE D'EXAMEN

Pour utiliser la **Fenêtre d'examen** en vue d'analyser le mouvement individuel du patient en tout point de la mandibule, procédez de la manière suivante :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 67 - SIDEXIS XG].
- ☑ La vue **Panorama** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 73 - SIDEXIS XG].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 80 - SIDEXIS XG].

- Déplacez la **Fenêtre d'examen** sur la région anatomique voulue :



- ▶ SICAT Function actualise la position des tracés de mouvement dans la vue **3D** en fonction de la position de la **Fenêtre d'examen**. Le point de tracé actuel se trouve sur le réticule de la fenêtre d'examen.
- ▶ Les tracés de mouvement se trouvent à la nouvelle position.

Si le point de tracé se trouve en dehors de la mandibule du patient, vous pouvez positionner les tracés de mouvement sur la mandibule du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 133 - SIDEXIS XG].




Pour déplacer immédiatement la **Fenêtre d'examen** sur la région anatomique voulue, vous pouvez aussi effectuer un double-clic à la position voulue dans la vue **Panorama**.

27.4 ADAPTER LES TRACÉS DE MOUVEMENTS DANS UNE VUE DE COUPE À L'AIDE DU RÉTICULE

Pour utiliser les réticules en vue d'analyser le mouvement individuel du patient en tout point de la mandibule, procédez de la manière suivante :

- ☑ Les réticules sont affichés dans les vues de coupes 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 79 - SIDEXIS XG].
- 1. Activez la vue de coupe 2D voulue. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 73 - SIDEXIS XG].
- 2. Déplacez le réticule sur la région anatomique voulue. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 79 - SIDEXIS XG].

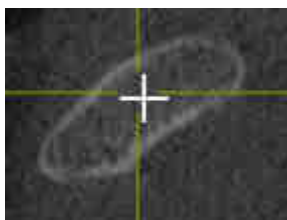

- ▶ SICAT Function actualise la position des tracés de mouvement dans la vue **3D** en fonction de la position du réticule.



Dans la vue **3D**, SICAT Function marque les tracés de mouvement en rouge lorsque vous choisissez une position située en dehors de la mandibule du patient.




Pour déplacer directement le réticule à la position du pointeur de la souris, vous pouvez également double-cliquer dans une vue 2D.

28 FONCTIONS DE L'ESPACE DE TRAVAIL TMJ

L'espace de travail **TMJ** vous assiste dans le diagnostic et la planification du traitement de dysfonctionnements craniomandibulaires. Dans l'espace de travail **TMJ**, vous pouvez comparer la morphologie et le mouvement des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite.

Dans l'espace de travail **TMJ**, vous pouvez afficher simultanément trois tracés différents pour chaque mouvement :

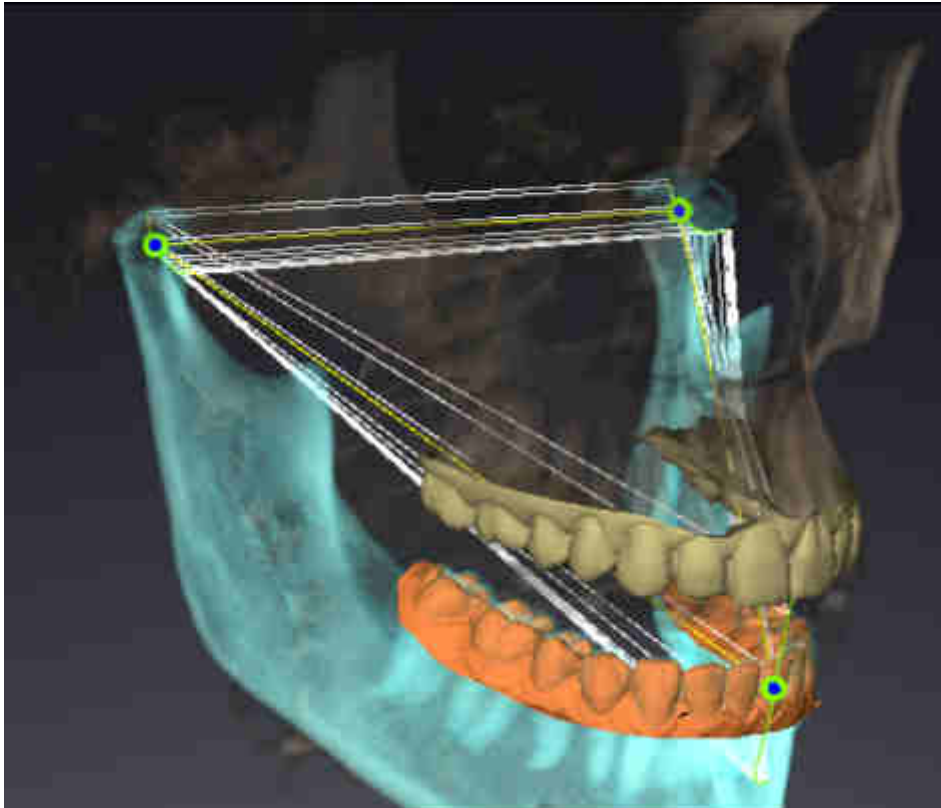

- Tracé pour le condyle gauche
- Tracé pour le condyle droit
- Tracé pour un point de l'occlusion, par exemple le point inter-incisif.

Vous pouvez déplacer les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer les points de tracé* [▶ Page 135 - SIDEXIS XG].

Dans la vue **3D**, vous pouvez placer le point de tracé du point inter-incisif à l'aide d'un double clic. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Placer le point inter-incisif* [▶ Page 136 - SIDEXIS XG].

L'espace de travail **TMJ** offre des options supplémentaires pour l'examen de l'articulation anatomique individuelle d'un patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher la limite de la segmentation* [▶ Page 138 - SIDEXIS XG], *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [▶ Page 139 - SIDEXIS XG] et *Utilisation du triangle de Bonwill* [▶ Page 137 - SIDEXIS XG]. Vous pouvez également utiliser le triangle de Bonwill pour relever des valeurs de l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Valeurs d'articulateur* [▶ Page 140 - SIDEXIS XG].

28.1 DÉPLACER LES POINTS DE TRACÉ


SICAT Function affiche simultanément les tracés des points correspondants du condyle gauche et du condyle droit. À l'aide de ces tracés, vous pouvez comparer le mouvement complet des articulations entre elles.

Procédez de la manière suivante pour déplacer les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe :

Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ** *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 134 - *SIDEXIS XG*] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 64 - *SIDEXIS XG*].

Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.


1. Amenez le pointeur de la souris sur le point de tracé de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position du point de tracé voulue.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function déplace les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe sur la position sélectionnée :

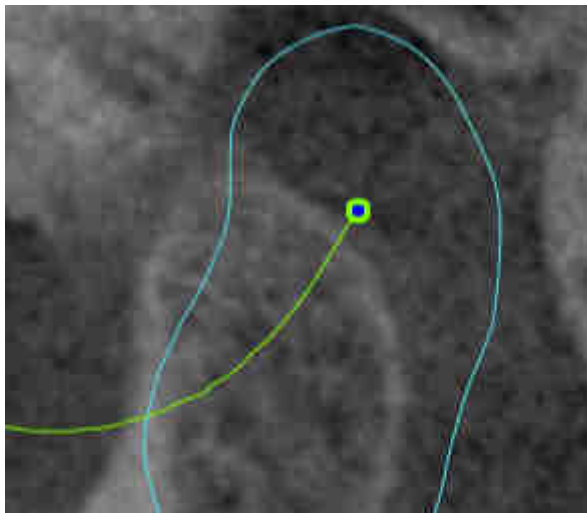

28.2 PLACER LE POINT INTER-INCISIF

Procédez de la manière suivante pour placer le point inter-incisif dans la vue **3D** :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ** *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 134 - *SIDEXIS XG*] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 64 - *SIDEXIS XG*].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.
 - Amenez le pointeur de la souris à la position voulue dans la vue **3D** puis double-cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function utilise la position sélectionnée sur les empreintes dentaires numériques comme point de tracé :

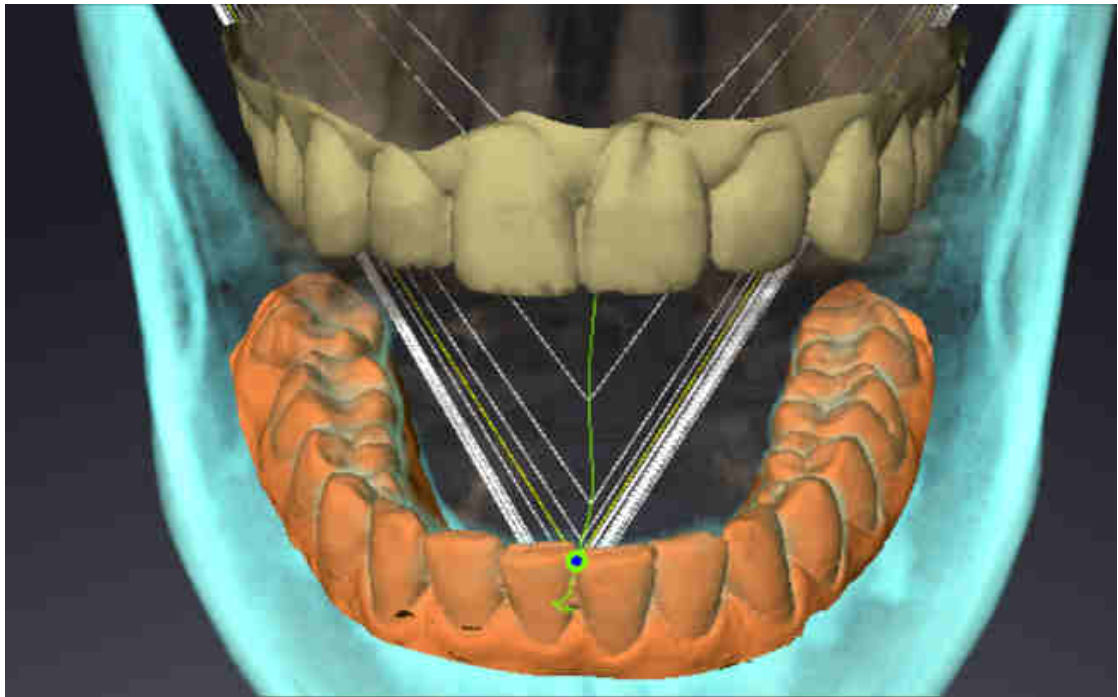

Avec une vue frontale sur le point inter-incisif, vous pouvez identifier et observer en détail les mouvements latéraux de la mandibule.


28.3 UTILISATION DU TRIANGLE DE BONWILL

AFFICHER LE TRIANGLE DE BONWILL

À l'aide du **Triangle de Bonwill**, SICAT Function visualise la relation entre les trois points de tracé. Ceci permet de détecter facilement les dissymétries et les discontinuités dans les mouvements.

Procédez de la manière suivante pour afficher le **Triangle de Bonwill** :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [► Page 134 - SIDEXIS XG] et **Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ** [► Page 64 - SIDEXIS XG].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.
 - Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique dans **Propriétés** la **Triangle de Bonwill** :

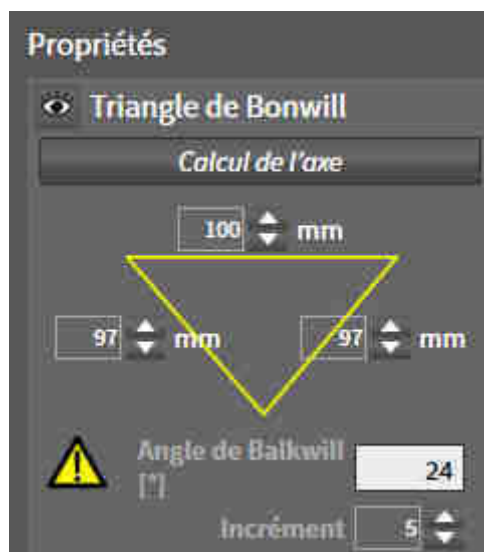

CONFIGURER LE TRIANGLE DE BONWILL

Procédez de la manière suivante pour régler l'incrément du triangle de Bonwill :

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Données de mouvement**.
2. Cliquez dans la zone **Propriétés** à côté de **Incrément** sur une des touches fléchées.
 - SICAT Function modifie la valeur du champ **Incrément**.
 - La vue **3D** représente l'incrément sélectionné du triangle de Bonwill.



Réglez l'incrément de manière à ce que d'éventuelles dissymétries du mouvement soient aisément détectables.

28.4 AFFICHER LA LIMITE DE LA SEGMENTATION

L'activation de la limite de la segmentation vous permet de comparer la qualité de la segmentation avec les radiographies 3D. Au cas où la limite de la segmentation s'écarte de la radiographie 3D, vous pouvez corriger la segmentation dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**.


Le contour bleu indique la position des condyles en fonction du mouvement actuel. Par conséquent, le contour bleu n'est généralement pas superposable aux radiographies 3D et ne convient pas au contrôle de la qualité de la segmentation. Utilisez plutôt le contour jaune pour vérifier la limite de la segmentation.

Procédez de la manière suivante pour afficher la limite de la segmentation :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail **TMJ** dans *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 134 - *SIDEXIS XG*] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 64 - *SIDEXIS XG*].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique ou une relation intermaxillaire statique.

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Régions du volume**.

► SICAT Function affiche sous **Propriétés** l'option **Afficher la limite de la segmentation** :

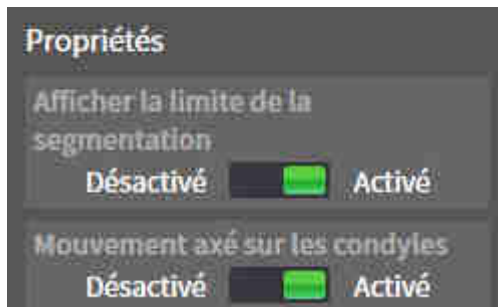

2. Déplacez le curseur de réglage de l'option **Afficher la limite de la segmentation** sur la position **Activé**.

► Les vues 2D affichent la limite de la segmentation avec un contour jaune.

SICAT Function marque la position segmentée de l'articulation à l'aide de différentes couleurs :

- SICAT Function repère les condyles en mouvement à la position segmentée en bleu.
- SICAT Function repère la segmentation originale des radiographies 3D par une ligne de contrôle. SICAT Function marque la ligne de contrôle en jaune.

28.5 AFFICHER LE MOUVEMENT AXÉ SUR LES CONDYLES


Le mouvement axé sur les condyles permet de visualiser les condyles en mouvement en relation avec les fosses. Lorsque le mouvement axé sur les condyles est activé, tous les points des condyles sont visibles pendant la totalité du mouvement dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**. Lorsque le mouvement axé sur les condyles est désactivé, tous les points des fosses sont visibles pendant la totalité du mouvement dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**.

Procédez de la manière suivante pour visualiser le mouvement axé sur les condyles :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [▶ Page 134 - SIDEXIS XG] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 64 - SIDEXIS XG].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique ou une relation intermaxillaire statique.

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Régions du volume**.

▶ SICAT Function affiche sous **Propriétés** l'option **Mouvement axé sur les condyles** :

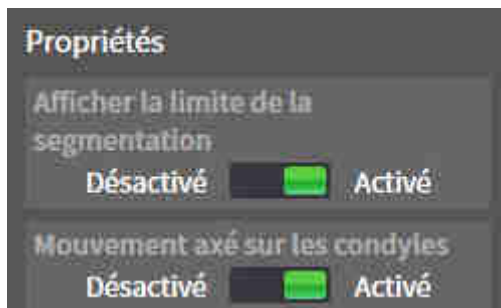

2. Déplacez le curseur de réglage de l'option **Mouvement axé sur les condyles** sur la position **Activé**.

▶ La vue **3D** représente le mouvement axé sur les condyles.

29 VALEURS D'ARTICULATEUR



Une mauvaise orientation du volume, une détermination erronée du point incisif peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. Assurez-vous que la radiographie 3D est alignée de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure soit parallèle aux coupes axiales.
2. Assurez-vous que vous avez sélectionné une relation intermaxillaire dans laquelle les dents du patient sont en occlusion de sorte que les plans d'occlusion des mâchoires supérieure et inférieure correspondent.
3. Assurez-vous que le point incisif dans le logiciel repose sur le point incisif anatomique correct entre les incisives inférieures centrales.



Une définition insuffisamment précise du triangle de Bonwill peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. Assurez-vous que vous avez la définition du triangle de Bonwill conformément aux repères anatomiques corrects.
2. Assurez-vous que la définition du triangle de Bonwill est adaptée à l'objectif prévu.



L'utilisation de données de mouvement de la mâchoire incorrectes peut entraîner le calcul erroné de l'axe charnière.

Utilisez exclusivement un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé pour le calcul de l'axe charnière.

SICAT Function vous aide à déterminer les valeurs d'articulateur propres au patient. Vous pouvez construire et fabriquer des restaurations individuelles en transmettant les valeurs à un articulateur. Actuellement, l'établissement des paramètres pour les articulateurs, qui utilisent le plan d'occlusion comme niveau de référence, est optimisé.

L'articulateur virtuel du logiciel CEREC (Dentsply Sirona) est un exemple d'articulateur qui utilise le plan d'occlusion comme niveau de référence. Les instructions de service de CEREC comprennent des informations sur la manière de programmer l'articulateur CEREC avec des valeurs individuelles.

APPAREIL DE MESURE DU MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE NÉCESSAIRE

Vous pouvez établir la plupart des valeurs d'articulateur à l'aide d'enregistrements de mouvements de mâchoires. Vous avez besoin d'enregistrements de mouvements de mâchoires d'un type déterminé pour établir des valeurs :

VALEUR D'ARTICULATEUR	ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS DE MÂCHOIRE NÉCESSAIRE
Inclinaison sagittale des voies d'articulation des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite.	Protrusion
Angles de Bennett gauche et droit ainsi que mouvements latéraux immédiats gauche et droit.	Latérotussions gauche et droite

VALEUR D'ARTICULATEUR	ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS DE MÂCHOIRE NÉCESSAIRE
Axe charnière	Mouvement d'ouverture réalisé ou mouvement de fermeture réalisé

VALEURS POUR L'ARTICULATEUR CEREC

Vous pouvez établir les valeurs suivantes pour l'articulateur CEREC avec SICAT Function.

PARAMÈTRES DE L'ARTICULATEUR CEREC	DESCRIPTION
Côté	Les côtés sont les distances du condyle gauche ou droit par rapport au point incisif entre les incisives inférieures centrales. SICAT Function indique les longueurs du côté directement sur le triangle de Bonwill.
Base	La base est la distance entre les condyles gauche et droit (distance intercondylienne). SICAT Function indique la longueur de la base directement sur le triangle de Bonwill.
Angle de Balkwill	L'angle de Balkwill est l'angle entre le plan d'occlusion et le triangle de Bonwill. SICAT Function indique l'angle de Balkwill directement sur le triangle Bonwill.
Inclinaison sagittale des voies d'articulation gauche et droite.	L'inclinaison sagittale des voies d'articulation est l'angle entre la trajectoire de protrusion du condyle gauche ou droit et le plan d'occlusion. Vous pouvez mesurer cet angle dans les vues sagittales de l'espace de travail TMJ à l'aide d'une trajectoire de protrusion. Ce faisant, assurez-vous que les données de radiographie 3D soient alignées horizontalement par rapport au plan d'occlusion de la mâchoire supérieure. À ce propos, observez absolument les consignes de sécurité concernant l'orientation du volume. Mesurez l'angle entre la trajectoire de protrusion des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite ainsi que l'horizontale.
Angles de Bennett gauche et droit	L'angle de Bennett est l'angle entre le mouvement de protrusion et la latérotrusion. Vous pouvez mesurer cet angle dans les vues axiales de l'espace de travail TMJ à l'aide d'une latérotrusion sur les côtés gauche et droit. Ce faisant, assurez-vous que les radiographies 3D soient alignées horizontalement par rapport au plan d'occlusion de la mâchoire supérieure. À ce propos, observez absolument les consignes de sécurité concernant l'orientation du volume. Mesurez l'angle entre la trajectoire de latérotrusion et le plan sagittal.

PARAMÈTRES DE L'ARTICULATEUR CEREC	DESCRIPTION
	Mouvements latéraux immédiats gauche et droit

VISIBILITÉ DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D

Vous pouvez évaluer les valeurs d'articulateur essentiellement à l'aide d'enregistrements de mouvements de mâchoires. Vous ne pouvez pas établir seulement la distance intercondylienne (longueur de « base » du triangle de Bonwill dans l'articulateur CEREC) à partir de données de mouvement de la mâchoire uniquement.

S'il n'est pas possible de voir les articulations temporo-mandibulaires sur la radiographie 3D, vous pouvez établir le côté de « base » du triangle de Bonwill à l'aide de l'axe charnière. Vous pouvez établir l'axe charnière à l'aide d'un mouvement d'ouverture ou un mouvement de fermeture réalisé. L'important à cet égard est que la mâchoire inférieure décrive un mouvement de rotation et ne se déplace pas vers l'avant.

Vous pouvez établir cependant la distance intercondylienne à l'aide de la radiographie 3D. Le tableau suivant indique de quelles données de mouvement de la mâchoire vous avez besoin pour quelle valeur d'articulateur :

	IL EST POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.	IL N'EST PAS POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez utilisé un appareil de radiographie avec un grand champ de vision (FOV) pour la radiographie 3D. 	<p>Vous avez utilisé un appareil de radiographie avec un petit champ de vision (FOV) pour la radiographie 3D.</p> <p>Vous avez effectué une radiographie 3D d'un modèle en plâtre.</p>
Conséquence	Il est possible de placer le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au niveau des condyles sur la radiographie 3D.	Il n'est pas possible de placer le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au niveau des condyles sur la radiographie 3D.

	IL EST POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.	IL N'EST PAS POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.
Étapes nécessaires	Placez le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit dans les vues de coupe de l'espace de travail TMJ . Pour ce faire, orientez-vous selon la position des condyles sur la radiographie 3D.	L'enregistrement d'un mouvement d'ouverture réalisé et d'un mouvement de fermeture réalisé est nécessaire au calcul de l'axe de charnière. Un mouvement d'ouverture ou un mouvement de fermeture réalisé se caractérise en ce que le patient ouvre ou ferme la mâchoire de quelques millimètres et vous manipulez les condyles avec la prise de Lauritzen ou la prise de Dawson de telle sorte que la mâchoire inférieure ne se déplace pas vers l'avant. SICAT Function place le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de telle manière que les deux points de dépistage reposent automatiquement sur l'axe de charnière des articulations temporo-mandibulaires.

LE TRIANGLE DE BONWILL DANS SICAT FUNCTION

Le triangle de Bonwill dans SICAT Function vous aide à établir les valeurs d'articulateur suivantes :

- Côtés gauche et droite [mm]
- Base [mm]
- Angle de Balkwill [°]

La condition préalable à cet effet est que les trois points angulaires du triangle de Bonwill soient correctement placés.

- Point de dépistage gauche
- Point de dépistage droit
- Point incisif

Vous pouvez placer le point incisif dans la vue **3D** dans l'espace de travail **TMJ** en double-cliquant sur le point anatomique correct. Le placement que ce soit du point de dépistage gauche mais également du point de dépistage droit se différencie selon si les condyles sont visibles ou pas sur la radiographie 3D.


Pour savoir comment relever les valeurs d'articulateur, reportez-vous au paragraphe *Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles visibles* [► Page 144 - SIDEXIS XG] ou *Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles invisibles* [► Page 146 - SIDEXIS XG].

29.1 RELEVER DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC DES CONDYLES VISIBLES


RÉGLAGE DU TRIANGLE DE BONWILL AVEC DES CONDYLES VISIBLES

Utilisez les vues de coupe pour les étapes suivantes dans l'espace de travail **TMJ** :

1. Cliquez sur le point de dépistage gauche ou le point de dépistage droit, maintenez enfoncée la touche gauche de la souris et placez le point de dépistage dans le condyle respectif.
2. Placez le point incisif entre les incisives inférieures après avoir double-cliqué sur la position anatomique correcte. Si vous ne pouvez voir aucun point incisif entre les incisives inférieures, sélectionnez un mouvement d'ouverture et ouvrez légèrement la mâchoire. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - *SIDEXIS XG*].

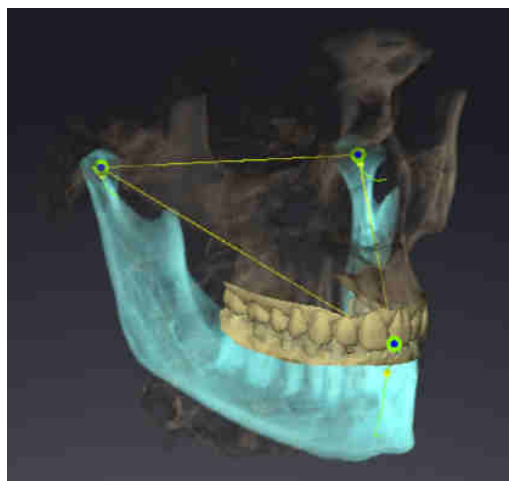

La capture d'écran montre une radiographie 3D avec un grand champ de vision (FOV) dans lequel un triangle de Bonwill est aligné sur l'anatomie du patient. Les condyles sont visibles. Le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit sont placés au centre des condyles visibles. Le point incisif dans SICAT Function est placé entre les incisives inférieures.

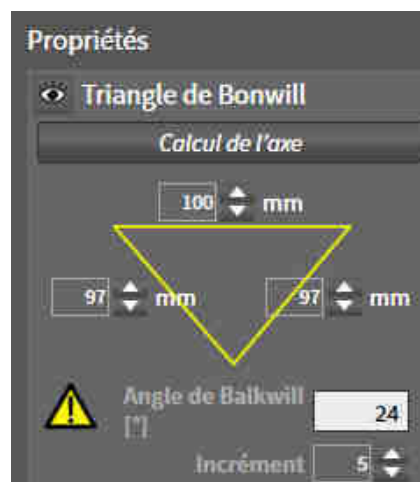

SICAT Function indique les longueurs en mm des côtés du triangle de Bonwill. Vous pouvez noter directement les valeurs de l'articulateur. SICAT Function indique également l'angle de Balkwill. L'angle de Balkwill est valable uniquement pour les mâchoires fermées.

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC CONDYLES VISIBLES

Procédez de la manière suivante pour établir les valeurs d'articulateur :

- ☑ Vous avez disposé la radiographie 3D de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure est orienté horizontalement et les mâchoires sont pratiquement symétriques par rapport au plan sagittal médian. Ces alignements corrects sont nécessaires afin que vous puissiez saisir correctement les données et les transmettre dans l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 94 - *SIDEXIS XG*].
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Données de mouvement* [► Page 104 - *SIDEXIS XG*].


- ☑ L'espace de travail **TMJ** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 64 - SIDEXIS XG].
 - ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique dans la liste **Relation intermaxillaire active**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 128 - SIDEXIS XG].
1. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - ▶ SICAT Function indique le triangle de Bonwill dans l'espace **Propriétés**.
 2. Mettez le point incisif dans la vue **3D** entre les incisives inférieures en double-cliquant sur la position anatomique correcte sur la mâchoire inférieure segmentée ou sur les empreintes optiques. Si le point incisif des incisives inférieures est caché, ouvrez les mâchoires en visionnant le mouvement jusqu'à ce que les incisives inférieures soient visibles. Placez le point incisif en double-cliquant puis refermez les mâchoires.
 3. Mettez le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au centre des condyles en déplaçant les points de dépistage dans les vues coronales, sagittales et axiales.
 4. Assurez-vous que les longueurs des côtés sont symétriques.
 5. Notez les valeurs de base, de côtés (cette valeur est identique des deux côtés) et de l'angle de Balkwill.
 6. Sélectionnez pendant le mouvement de protrusion sélectionné un instant pendant lequel les mâchoires sont fermées. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 128 - SIDEXIS XG].
 7. Assurez-vous que les rangées de dents sont fermées.
 8. Mesurez la pente condylienne avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche et l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues sagittales. Notez les valeurs.
 9. Sélectionnez la latérotusion vers la gauche. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues axiales. Notez la valeur.
 10. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.
 11. Sélectionnez la latérotusion vers la droite. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche dans les vues axiales. Notez la valeur.
 12. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.

29.2 RELEVER DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC DES CONDYLES INVISIBLES


RÉGLAGE DU TRIANGLE DE BONWILL AVEC DES CONDYLES INVISIBLES

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé dans la liste **Relation intermaxillaire active**.
 2. Cliquez sur le bouton **Calcul de l'axe**.
- ▶ SICAT Function montre l'axe calculé sous forme d'une ligne pointillée dans la vue **3D**. SICAT Function place automatiquement le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de manière à ce que les deux points de dépistage se trouvent sur l'axe de charnière calculé dans l'espace de travail **TMJ**.
 - ▶ Si vous sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**, SICAT Function affiche l'axe calculé dans la zone **Propriétés**.

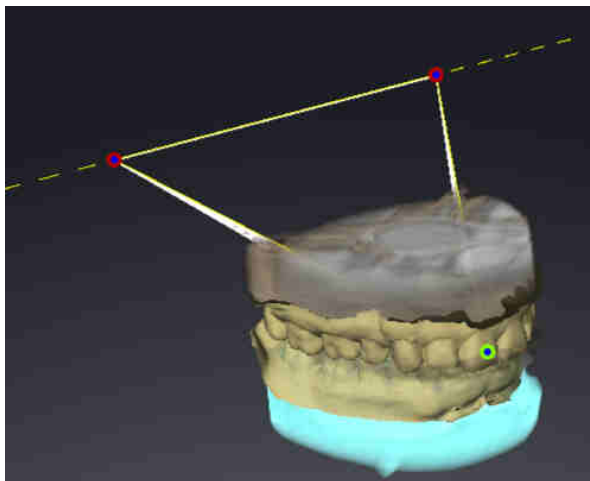

La capture d'écran montre en exemple un scan de modèle en plâtre sur lequel les condyles ne sont pas visibles. L'axe de charnière a été établi à partir d'un mouvement d'ouverture réalisé. La ligne en pointillé esquisse l'axe calculé. SICAT Function a placé automatiquement le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de telle manière que les deux points de dépistage se trouvent sur l'axe calculé. Le point incisif dans SICAT Function est placé entre les incisives inférieures.

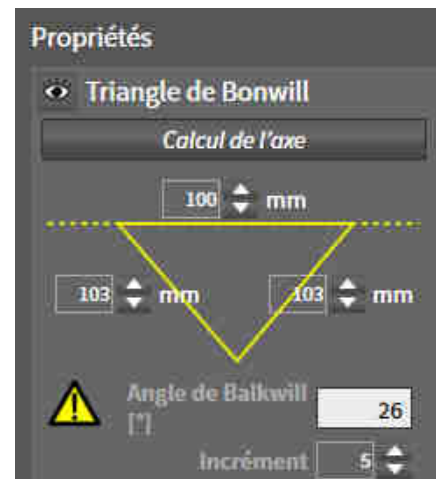

SICAT Function indique les longueurs en mm des côtés du triangle de Bonwill. Vous pouvez noter directement les valeurs de l'articulateur. SICAT Function indique également l'angle de Balkwill. L'angle de Balkwill est valable uniquement pour les mâchoires fermées.

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC CONDYLES INVISIBLES

Procédez de la manière suivante pour établir les valeurs d'articulateur :

- ☑ Vous avez disposé la radiographie 3D de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure est orienté horizontalement et les mâchoires sont pratiquement symétriques par rapport au plan sagittal médian. Ces alignements corrects sont nécessaires afin que vous puissiez saisir correctement les données et les transmettre dans l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 94 - SIDEXIS XG].
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Données de mouvement* [► Page 104 - SIDEXIS XG].
- ☑ L'espace de travail **TMJ** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 64 - SIDEXIS XG].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique dans la liste **Relation intermaxillaire active** . Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].

1. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique le triangle de Bonwill dans l'espace **Propriétés**.
2. Mettez le point incisif dans la vue **3D** entre les incisives inférieures en double-cliquant sur la position anatomique correcte sur la mâchoire inférieure segmentée ou sur les empreintes optiques. Si le point incisif des incisives inférieures est caché, ouvrez les mâchoires en visionnant le mouvement jusqu'à ce que les incisives inférieures soient visibles. Placez le point incisif en double-cliquant puis refermez les mâchoires.
3. Sélectionnez un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé dans la liste **Relation intermaxillaire active** .
4. Dans la zone **Propriétés**, cliquez sur le bouton **Calcul de l'axe**. Si nécessaire, fixez la longueur de la base sur la valeur moyenne de 100 mm.
5. Assurez-vous que les longueurs des côtés sont symétriques.
6. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique les valeurs pour la base, les côtés et l'angle de Balkwill dans la zone **Propriétés**.
7. Notez les valeurs de base, de côtés (les deux valeurs gauche et droite doivent être identiques pour la programmation de l'articulateur) et de l'angle de Balkwill.
8. Sélectionnez un mouvement de protrusion. Sélectionnez pendant le mouvement de protrusion un instant pendant lequel les mâchoires sont fermées. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].
9. Assurez-vous que les rangées de dents sont fermées.
10. Mesurez la pente condylienne avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche et l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues sagittales. Notez les valeurs.

11. Sélectionnez la latérotusion vers la gauche. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues axiales. Notez la valeur.
12. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.
13. Sélectionnez la latérotusion vers la droite. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche dans les vues axiales. Notez la valeur.
14. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Notez la valeur.

30 MESURES DE DISTANCES ET D'ANGLES

Deux types de mesure sont disponibles dans SICAT Function :



- Mesures de distances



- Mesures d'angles

Les outils dédiés aux mesures sont disponibles dans l'étape **Diagnostiquer** de la **Barre d'outils de flux de travail**. Vous pouvez ajouter des mesures dans toutes les vues de coupes 2D. Chaque fois que vous ajoutez une mesure, SICAT Function l'ajoute aussi au groupe **Mesures** dans le **Navigateur d'objets**.




Vous ne pouvez pas ajouter d'objets de mesure dans la **Fenêtre d'examen**.

Les actions suivantes sont disponibles pour les mesures :

- *Ajouter des mesures de distances* [▶ Page 150 - SIDEXIS XG]
- *Ajouter des mesures d'angles* [▶ Page 151 - SIDEXIS XG]
- *Déplacer des mesures, des points de mesure et des valeurs de mesure* [▶ Page 153 - SIDEXIS XG]
- *Activer, masquer et afficher des mesures - vous trouverez des informations à ce sujet sous Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [▶ Page 56 - SIDEXIS XG].
- *Focaliser, supprimer les mesures, annuler et répéter les manipulations des mesures - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [▶ Page 58 - SIDEXIS XG].

30.1 AJOUTER DES MESURES DE DISTANCES

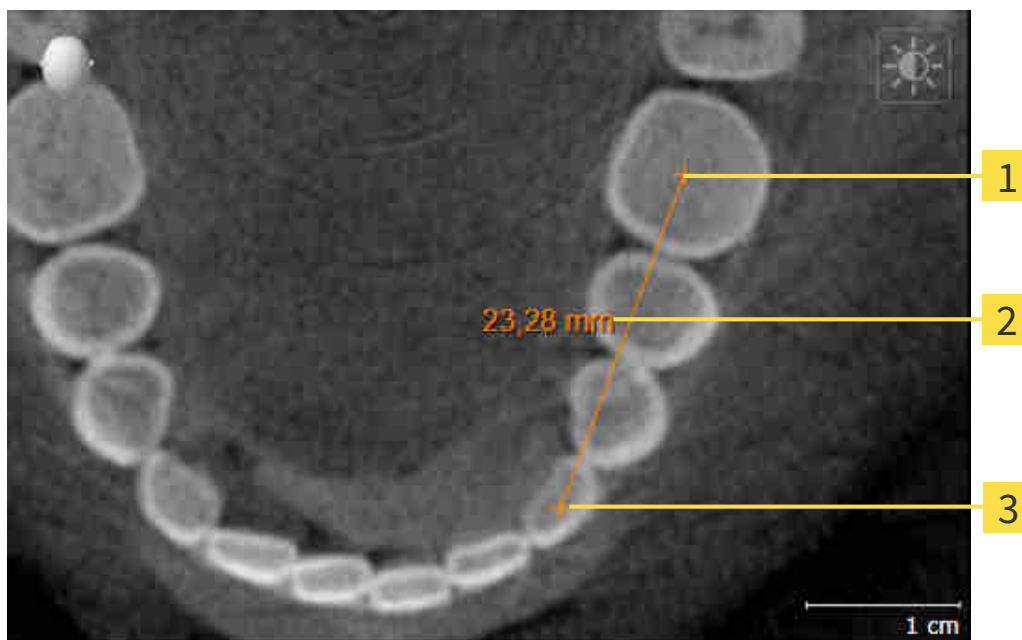

1 Point initial

2 Valeur de mesure

3 Point final

Procédez de la manière suivante pour ajouter une mesure de distance :

L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.




1. Cliquez dans l'étape de travail **Diagnostiquer** sur l'icône **Ajouter une mesure de distance (D)**.
 - ▶ SICAT Function ajoute une nouvelle mesure de distance au **Navigateur d'objets**.
2. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
3. Cliquez sur le point initial de la mesure de distance.
 - ▶ SICAT Function représente le point initial par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function affiche une ligne de distance entre le point initial et le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function visualise la distance actuelle séparant le point initial du pointeur de la souris au milieu de la ligne de distance ainsi que dans le **Navigateur d'objets**.
4. Amenez le pointeur de la souris sur le point final de la mesure de distance puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente le point final par une petite croix.



Vous pouvez à tout moment annuler l'ajout de mesures en appuyant sur **Échap**.

30.2 AJOUTER DES MESURES D'ANGLES

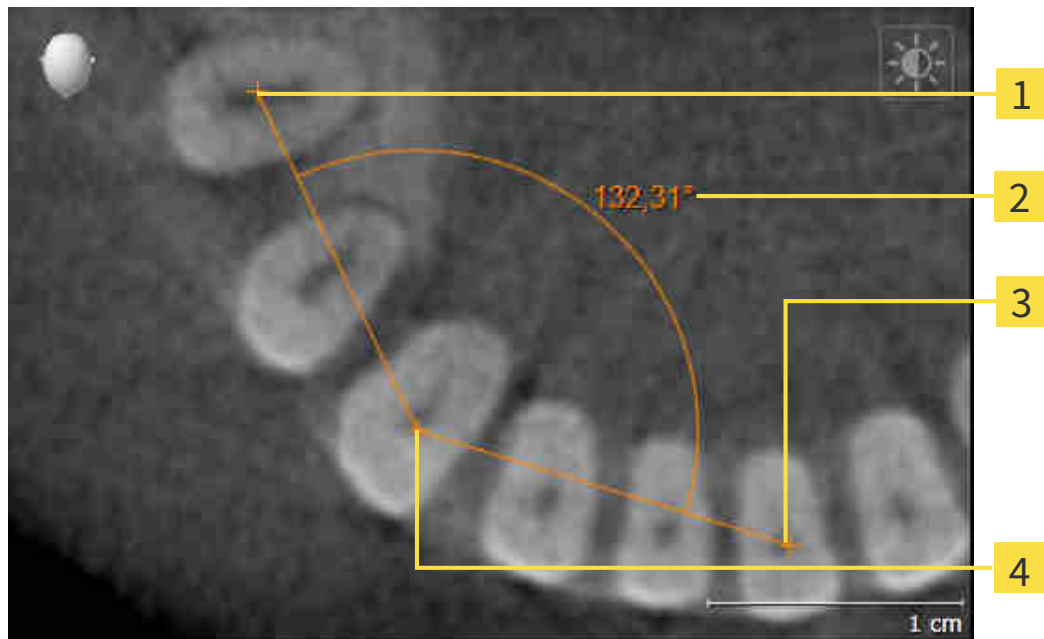

1 Point initial

2 Valeur de mesure

3 Point final

4 Sommet

Procédez de la manière suivante pour ajouter une mesure d'angle :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.



1. Cliquez dans l'étape de travail **Diagnostiquer** sur l'icône **Ajouter une mesure d'angle (A)**.
 - ▶ SICAT Function ajoute une nouvelle mesure d'angle au **Navigateur d'objets**.
2. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
3. Cliquez sur le point initial de la mesure d'angle.
 - ▶ SICAT Function représente le point initial par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function représente le premier côté de la mesure d'angle par une ligne entre le point initial et le pointeur de la souris.
4. Amenez le pointeur de la souris sur le sommet de l'angle à mesurer puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente le sommet par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function représente le deuxième côté de la mesure d'angle par une ligne entre le sommet de l'angle et le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function visualise l'angle actuel entre les deux côtés de la mesure d'angle ainsi que dans le **Navigateur d'objets**.

5. Amenez le pointeur de la souris sur le point final du deuxième côté de l'angle puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.

► SICAT Function représente le point final par une petite croix.



Vous pouvez à tout moment annuler l'ajout de mesures en appuyant sur **Échap**.

30.3 DÉPLACER DES MESURES, DES POINTS DE MESURE ET DES VALEURS DE MESURE

DÉPLACER DES MESURES

Procédez de la manière suivante pour déplacer une mesure :

SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 56 - SIDEXIS XG] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 58 - SIDEXIS XG].

1. Amenez le pointeur de la souris sur une ligne de la mesure.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position de la mesure voulue.
 - La mesure suit le déplacement de la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle de la mesure.

DÉPLACER DES POINTS DE MESURE INDIVIDUELS

Procédez de la manière suivante pour déplacer un point de mesure individuel :

SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 56 - SIDEXIS XG] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 58 - SIDEXIS XG].

1. Amenez le pointeur de la souris sur le point de mesure de votre choix.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position du point de mesure voulue.
 - Le point de mesure suit le déplacement de la souris.
 - La valeur de mesure change à mesure que vous déplacez la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle du point de mesure.

DÉPLACER DES VALEURS DE MESURE

Procédez de la manière suivante pour déplacer une valeur de mesure :

☑ SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [▶ Page 56 - SIDEXIS XG] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [▶ Page 58 - SIDEXIS XG].

1. Amenez le pointeur de la souris sur la valeur de mesure de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position de la valeur de mesure voulue.
 - ▶ La valeur de mesure suit le déplacement de la souris.
 - ▶ SICAT Function affiche une ligne pointillée entre la valeur de mesure et la mesure correspondante.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la position actuelle du point de mesure.



Une fois que la valeur d'une mesure a été déplacée, SICAT Function attribue une position absolue à la valeur de mesure. Pour restaurer la position relative de la valeur de mesure, vous pouvez double-cliquer sur la valeur.

31 EXPORTATION DE DONNÉES

Vous pouvez exporter des données.

Vous pouvez exporter les données patient et les données de volume actuellement ouvertes.

Il s'agit de l'étude qui a été ouverte à partir de SIDEXIS XG.

REMARQUE

Réimportation de données exportées

Des données préalablement exportées à partir de SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG ne peuvent être importées que dans la version standalone de SICAT Suite.

SICAT Suite peut exporter les données suivantes :

- Dossiers patient (DICOM)
- Études 3D
- Documents

Les données exportées peuvent contenir les éléments suivants :

TYPE DE DONNÉES	FORMAT D'EXPORTATION
Radiographies 3D	DICOM
Études 3D	Propriétaire de SICAT
Document	PDF

SICAT Suite exporte des radiographies 3D et des études dans des archives ZIP ou des répertoires DICOM. Si nécessaire, SICAT Suite peut anonymiser les données patient pour l'exportation.

Pour exporter des données, effectuez les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

- Ouvrez la fenêtre **Transmettre les données**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"* [▶ Page 156 - SIDEXIS XG].
- Exportez les données voulues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exporter des données* [▶ Page 157 - SIDEXIS XG].

31.1 OUVRIR LA FENÊTRE "TRANSMETTRE LES DONNÉES"

vous devez tout d'abord ouvrir la fenêtre **Transmettre les données** afin d'exporter des données.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Transmettre les données** dans SICAT Suite en tant que plug-in SIDEXIS XG :



- Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Transmettre les données**.

► La fenêtre **Transmettre les données** s'ouvre.



SICAT Suite exporte exclusivement les radiographies 3D et les projets de planification sélectionnés dans le dossier patient actif.

poursuivez avec *Exporter des données* [▶ Page 157 - SIDEXIS XG].

31.2 EXPORTER DES DONNÉES

Procédez de la manière suivante pour exporter des études :

- ☑ La fenêtre **Transmettre les données** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"* [▶ Page 156 - SIDEXIS XG].

1 Case à cocher **Anonymiser**

2 Attributs du dossier patient

3 Liste des études 3D

4 Champ **Sélectionnez le chemin de destination**

5 Bouton **Transmettre les données**

6 Case à cocher **Zipper le résultat dans un fichier**

1. Si vous le souhaitez, activez la case à cocher **Anonymiser** dans la fenêtre **Transmettre les données**.
 - ▶ Les attributs du dossier patient exporté sont modifiés en **Patient** pour le **NomAnonyme** pour le **Prénom** et **01.01.** suivi de l'année de naissance pour **Date de naissance**. Les attributs du dossier patient dans le dépôt de dossiers patient restent inchangés.
2. Assurez-vous que vous avez bien sélectionné les études 3D voulues du patient voulu.
3. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - ▶ La fenêtre **Rechercher un dossier** s'ouvre.
4. Dans la fenêtre **Rechercher un dossier**, sélectionnez un dossier cible et cliquez sur **OK**.
 - ▶ La fenêtre **Rechercher un dossier** se ferme et SICAT Suite reporte le chemin du dossier voulu dans le champ **Sélectionnez le chemin de destination**.
5. Cochez ou décochez la case **Zipper le résultat dans un fichier**.
6. Cliquez sur le bouton **Transmettre les données**.
 - ▶ SICAT Suite exporte les études sélectionnées dans un fichier ZIP ou dans le dossier sélectionné.



Les fichiers ZIP ainsi que le dossier contiennent les radiographies 3D au format DICOM et les données de planification au format de fichier propriétaire. Vous pouvez visualiser les radiographies 3D à l'aide de n'importe quel Viewer DICOM, et les données de planification à l'aide de l'application SICAT correspondante.

32 PROCESSUS DE COMMANDE

Procédez de la manière suivante pour commander le produit souhaité :

- Dans SICAT Function, définissez une position thérapeutique et insérez les données de planification de gouttières thérapeutiques souhaitées dans le panier. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [▶ Page 160 - SIDEXIS XG] et *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [▶ Page 162 - SIDEXIS XG].
- Contrôlez le panier et lancez la commande. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 167 - SIDEXIS XG].
- Terminez la commande soit directement sur l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite, soit sur un autre ordinateur doté d'une connexion Internet active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Terminer une commande via une connexion Internet active* [▶ Page 168 - SIDEXIS XG] ou *Terminer une commande sans connexion Internet active* [▶ Page 172 - SIDEXIS XG].



Vous pouvez ajouter au panier des commandes qui correspondent à la même radiographie 3D. Il est recommandé d'effectuer ensuite l'intégralité du processus de commande, car le contenu du panier est perdu lorsque vous quittez SICAT Suite.

32.1 DÉFINIR UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour définir une position thérapeutique :

- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 106 - SIDEXIS XG].
 - ☑ Vous avez déjà importé des empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG] et *Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT* [► Page 125 - SIDEXIS XG].
1. Si vous souhaitez définir une position thérapeutique sur la base d'une relation intermaxillaire statique, sélectionnez une relation intermaxillaire statique dans la liste **Relation intermaxillaire active** . Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].
 2. Si vous souhaitez définir une position thérapeutique sur la base d'un mouvement de la mâchoire, sélectionnez un mouvement de la mâchoire dans la liste **Relation intermaxillaire active** et sautez à la position souhaitée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 128 - SIDEXIS XG].



3. Cliquez sur le bouton **Position thérapeutique**.
 - Si vous avez sélectionné une position thérapeutique basée sur un mouvement de la mâchoire, SICAT Function place un signet à la position correspondante.
 - Le bouton **Position thérapeutique** se change en bouton **Supprimer la position thérapeutique**.
 - SICAT Function enregistre la position thérapeutique sélectionnée pour la commande d'une gouttière thérapeutique.

SUPPRIMER UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour supprimer une position thérapeutique définie :

- ☑ Vous avez sélectionné la relation intermaxillaire statique ou le signet d'un mouvement de la mâchoire sur laquelle ou lequel est basée la position thérapeutique définie.



1. Cliquez sur le bouton **Supprimer la position thérapeutique**.
 - SICAT Function ouvre une fenêtre de notification affichant le message suivant : **Voulez-vous vraiment supprimer la position thérapeutique**
2. Si vous voulez réellement supprimer la position thérapeutique, cliquez sur **Poursuivre**.

ÉCRASER UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour écraser une position thérapeutique définie :

Vous avez déjà défini une position thérapeutique.

1. Sélectionnez une relation intermaxillaire statique ou une position d'un mouvement de la mâchoire qui ne correspond pas à la position thérapeutique définie.




2. Cliquez sur le bouton **Position thérapeutique**.


► SICAT Function ouvre une fenêtre de notification affichant le message suivant : **Une position thérapeutique a déjà été définie. Si vous poursuivez, la position sera écrasée**

3. Cliquez sur **Poursuivre** si vous voulez réellement écraser la position thérapeutique.
poursuivez avec *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [► Page 162 - SIDEXIS XG].

32.2 AJOUTER DES GOUTTIÈRES THÉRAPEUTIQUES AU PANIER

ATTENTION  **Des données de commande incorrectes peuvent entraîner une commande erronée.**

Lorsque vous procédez à une commande, assurez-vous que vous sélectionnez et transmettez les données correctes pour cette commande.

ATTENTION  **Une commande erronée peut entraîner un traitement erroné.**

1. Vérifiez votre commande avant de l'envoyer.
2. Confirmez la planification correcte de votre commande.

Vous trouverez des informations générales sur le processus de commande dans *Processus de commande* [► Page 159 - SIDEXIS XG].


Dans SICAT Function, la première partie du processus de commande consiste à insérer une gouttière thérapeutique dans le panier. Pour pouvoir insérer une gouttière thérapeutique dans le panier, vous devez remplir certaines conditions préalables. Si vous n'avez pas rempli toutes les conditions nécessaires, SICAT Function vous en informe.

SI LES CONDITIONS REQUISES NE SONT PAS REMPLIES

- ☑ L'étape de flux de travail **Commander** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 53 - SIDEXIS XG].



1. Cliquez sur l'icône **Commander la gouttière thérapeutique**.
► La fenêtre **Commande incomplète** s'ouvre :

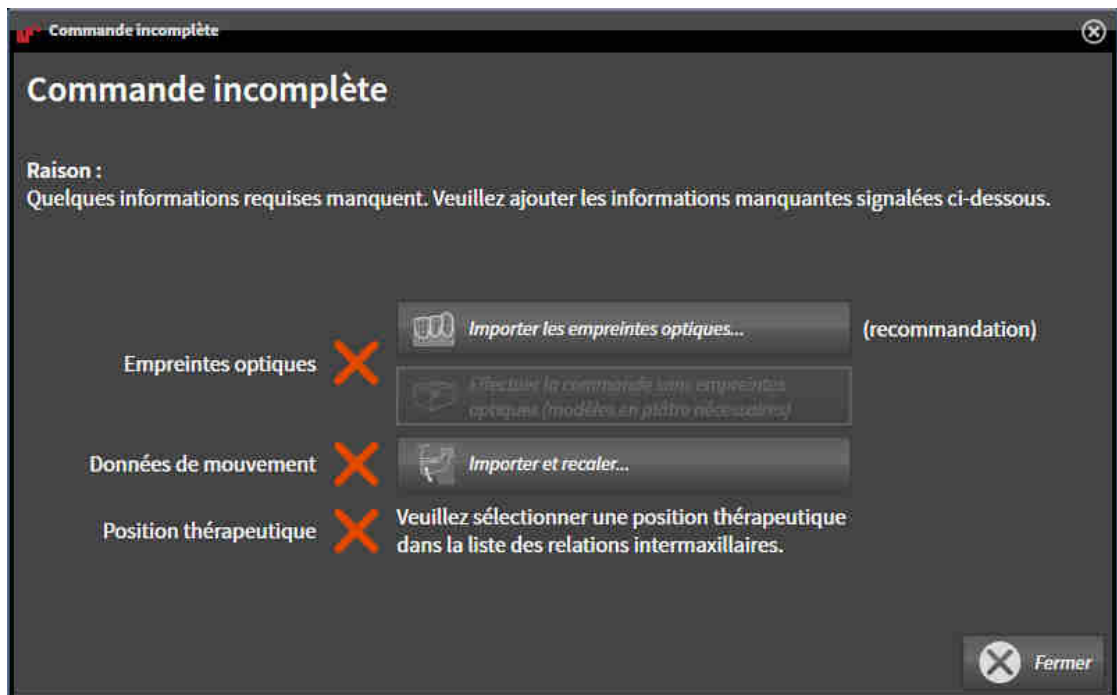



- Si vous n'avez pas encore importé d'empreintes optiques, cliquez sur le bouton **Importer et recalcr** et importez les empreintes optiques correspondant à la radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 118 - SIDEXIS XG].



- Si vous n'avez pas encore importé de données de mouvement de la mâchoire, cliquez sur le bouton **Importer et recalcr** et importez des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 106 - SIDEXIS XG].
- Si vous n'avez pas encore défini de position thérapeutique, fermez la fenêtre **Commande incomplète** et définissez une position thérapeutique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [► Page 160 - SIDEXIS XG].



Il est possible que vous deviez adapter l'orientation du volume et la courbe panoramique avant d'importer les empreintes optiques. Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** directement depuis la fenêtre **Importer et recalcr les empreintes optiques** à l'étape **Enregistrer** en cliquant sur le bouton **Adapter la zone panoramique**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter la zone panoramique* [► Page 101 - SIDEXIS XG].



Si vous souhaitez envoyer à SICAT des modèles en plâtre plutôt que des empreintes optiques, vous pouvez également ajouter des gouttières thérapeutiques sans empreintes optiques au panier, en cliquant sur le bouton **Effectuer la commande sans empreintes optiques (modèles en plâtre nécessaires)** dans la fenêtre **Commande incomplète**. L'étape **Commander une gouttière thérapeutique** affiche alors l'information **Cette commande ne contient pas d'empreintes optiques. Veuillez envoyer les modèles en plâtre correspondants à SICAT.**

SI LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES


- Vous avez déjà importé des empreintes optiques.
- Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire.
- Vous avez déjà défini une position thérapeutique.
- L'étape de flux de travail **Commander** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 53 - SIDEXIS XG].



- Cliquez sur l'icône **Commander la gouttière thérapeutique**.
- ▶ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** s'ouvre.

VÉRIFIEZ VOTRE COMMANDE DANS LA FENÊTRE "COMMANDER UNE GOUSSIÈRE THÉRAPEUTIQUE"

☑ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** est déjà ouverte :

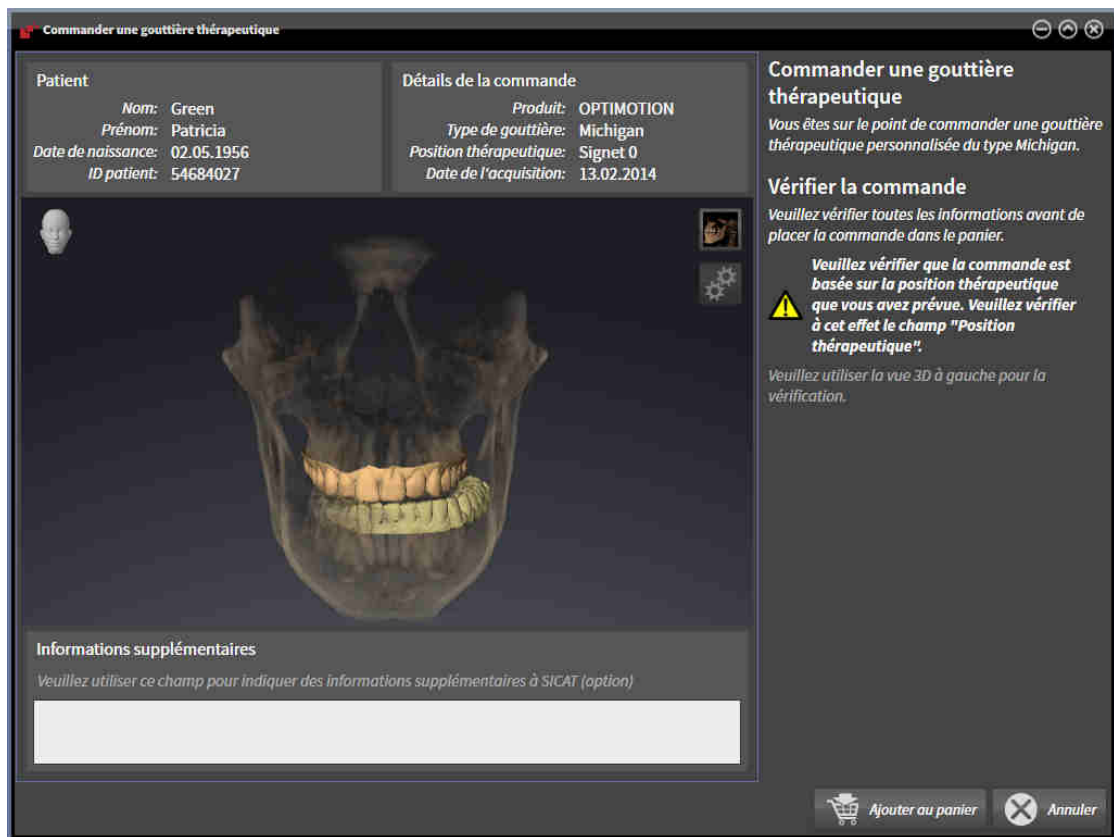

1. Vérifiez dans la zone **Patient** et dans la zone **Détails de la commande** que les informations relatives au patient et à la radiographie sont correctes.
2. Vérifiez dans la vue **3D** que la position thérapeutique est correcte.
3. Si vous le souhaitez, entrez des informations supplémentaires à destination de SICAT dans le champ **Informations supplémentaires**.



4. Cliquez sur le bouton **Dans le panier**.
 - ▶ SICAT Function insère les données de planification de gouttières thérapeutiques souhaitées dans le panier de SICAT Suite.
 - ▶ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ouvre le panier de SICAT Suite.



Tant qu'une commande se trouve dans le panier, vous ne pouvez plus écraser les empreintes optiques, les données de mouvement de la mâchoire et la position thérapeutique d'une planification. Cela ne redeviendra possible qu'après terminaison ou suppression de la commande. Si vous écrasez ou supprimez les empreintes optiques, les données de mouvement de la mâchoire ou la position thérapeutique d'une planification, vous ne pourrez plus commander encore une fois la même gouttière thérapeutique.



Vous pouvez annuler la commande en cliquant sur **Annuler**.

poursuivez avec *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 167 - SIDEXIS XG].

32.3 OUVRIR LE PANIER



L'icône **Panier d'achat** affiche le nombre d'éléments dans le panier.

- ☑ Le panier contient au moins un produit.



- Si le panier n'est pas encore ouvert, cliquez dans la **Barre de navigation** sur le bouton **Panier d'achat**.
- ▶ La fenêtre **Panier d'achat** s'ouvre.

Poursuivez avec l'action suivante :

- *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 167 - SIDEXIS XG]

32.4 CONTRÔLER LE PANIER ET TERMINER LA COMMANDE

- ☑ La fenêtre **Panier d'achat** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir le panier* [► Page 166 - SIDEXIS XG].



1 Liste **ARTICLE À COMMANDER**

2 Bouton **Terminer la commande**

1. Contrôlez dans la fenêtre **Panier d'achat** si tous les produits souhaités sont contenus.
 2. Cliquez sur le bouton **Terminer la commande**.
- ▶ SICAT Suite met le statut des commandes sur **En préparation** et établit une connexion au serveur SICAT via le SICAT WebConnector.
 - ▶ Avec une connexion Internet active, il n'est plus possible de modifier la commande que dans SICAT Portal.

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Terminer une commande via une connexion Internet active* [► Page 168 - SIDEXIS XG]
- *Terminer une commande sans connexion Internet active* [► Page 172 - SIDEXIS XG]

32.5 TERMINER UNE COMMANDE VIA UNE CONNEXION INTERNET ACTIVE



Sous certaines versions de Windows, il vous faut régler un navigateur standard afin que le processus de commande fonctionne.

- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
 - ☑ SICAT Portal a été ouvert automatiquement dans votre navigateur.
1. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 - ▶ La vue d'ensemble de votre commande s'ouvre et affiche les produits contenus, groupés par patient, ainsi que les prix.
 2. Suivez les instructions dans *Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal* [▶ Page 169 - *SIDEXIS XG*].
 - ▶ SICAT Suite prépare les données de commande pour le téléchargement.
 - ▶ Au terme des préparatifs, SICAT WebConnector transfère les données de commande sur le serveur SICAT via une connexion cryptée.
 - ▶ Le statut de la commande dans le panier passe à **En chargement**.



Vous pouvez ajouter au panier des commandes qui sont basées sur la même radiographie 3D. Il est recommandé d'effectuer ensuite l'intégralité du processus de commande, car le contenu du panier est perdu lorsque vous quittez SICAT Function.



Lorsque vous fermez puis rouvrez SIDEXIS XG, SICAT Suite indique que la commande est intégralement téléchargée, quel que soit son statut réel. Vous pouvez visualiser le statut réel dans SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *SICAT WebConnector* [▶ Page 170 - *SIDEXIS XG*].



Si vous vous déconnectez de Windows pendant le chargement, SICAT WebConnector met la procédure en pause. Le logiciel poursuit automatiquement le chargement après la nouvelle connexion.

32.6 EXÉCUTER LES ÉTAPES DE COMMANDE DANS SICAT PORTAL

Une fois que vous avez effectué les étapes de commande dans SICAT Suite, SICAT Portal s'ouvre dans votre navigateur Web standard. Dans SICAT Portal, vous avez la possibilité de modifier vos commandes, de sélectionner des fournisseurs qualifiés pour la fabrication et de consulter les prix des produits.

Procédez de la manière suivante pour exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal :

1. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
2. Contrôlez si les produits souhaités sont contenus.
3. Si nécessaire, supprimez des patients et, par la même occasion, les produits associés, de la vue d'ensemble de la commande. Lors de la finalisation de la commande, SICAT Suite reprend les modifications que vous avez effectuées dans SICAT Portal.
4. Vérifiez si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont correctes. Modifiez-les, si nécessaire.
5. Choisissez la méthode d'expédition souhaitée.
6. Acceptez les conditions générales de vente et envoyez la commande.



Vous pouvez supprimer des patients et toutes les gouttières associées de SICAT Portal en sélectionnant un patient et en cliquant sur le bouton de suppression de patients. Dans le panier, vous avez à nouveau pleinement accès à l'ensemble des produits.

32.7 SICAT WEBCONNECTOR



Le SICAT WebConnector nécessite des ports déterminés pour la communication avec le serveur SICAT. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Configuration système requise* [► Page 8 - SIDEXIS XG].



Sous certaines versions de Windows, il vous faut régler un navigateur standard afin que le processus de commande fonctionne.


Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite dispose d'une connexion Internet active, SICAT Suite transmet vos commandes sous forme cryptée, en tâche de fond, via le SICAT WebConnector. SICAT Function affiche le statut des transferts directement dans le panier et peut mettre le SICAT WebConnector en pause. SICAT WebConnector poursuit le transfert même lorsque vous avez fermé SICAT Suite. S'il n'est pas possible d'effectuer le chargement comme souhaité, vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur du SICAT WebConnector.

OUVRIR LA FENÊTRE "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- Cliquez dans la zone de notification de la barre des tâches sur l'icône **SICAT Suite WebConnector**.

► La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** s'ouvre :

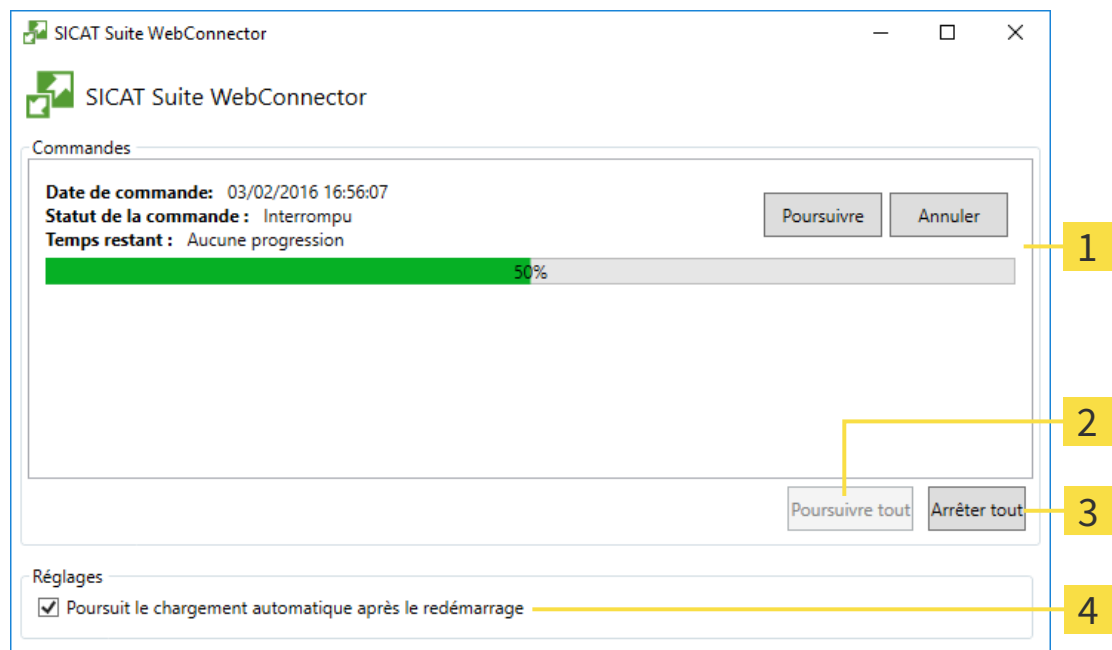

1 Liste **Commandes**

3 Bouton **Interrompre tous**

2 Bouton **Poursuivre tous**

4 Case à cocher **Poursuite automatique du chargement après le redémarrage**

La liste **Commandes** affiche la file d'attente de la commande.

INTERROMPRE ET POURSUIVRE LE CHARGEMENT

Vous pouvez interrompre la procédure de chargement. Ceci peut s'avérer utile lorsque votre liaison Internet est surchargée. Les réglages ne s'appliquent qu'aux procédures de chargement dans SICAT WebConnector. Les procédures de chargement via le navigateur Web ne sont pas concernées.

La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** est déjà ouverte.

1. Cliquez sur le bouton **Interrompre tous**.
 - ▶ SICAT WebConnector interrompt le chargement de toutes les commandes.
2. Cliquez sur le bouton **Poursuivre tous**.
 - ▶ SICAT WebConnector poursuit le chargement de toutes les commandes.

DÉSACTIVER LA POURSUITE AUTOMATIQUE APRÈS UN REDÉMARRAGE

Vous pouvez éviter que SICAT WebConnector ne poursuive automatiquement le chargement après un redémarrage de Windows.

La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** est déjà ouverte.

- Désactivez la case à cocher **Poursuite automatique du chargement après le redémarrage**.
- ▶ Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, SICAT WebConnector ne poursuit pas automatiquement le chargement de vos commandes.

32.8 TERMINER UNE COMMANDE SANS CONNEXION INTERNET ACTIVE

SICAT Suite ouvre la fenêtre **Erreur lors de la connexion au serveur SICAT** quand l'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute ne peut pas établir une connexion avec le serveur SICAT. La fenêtre vous indique une des causes suivantes du problème :

- **Aucune connexion Internet n'est disponible SICAT WebConnector n'a pas pu établir la connexion au serveur SICAT**
- **Le portail SICAT n'est pas accessible**
- **Le service « SICATWebConnector » n'est pas installé**
- **Le service « SICATWebConnector » n'est pas démarré**
- **Une erreur inconnue s'est produite. SICAT WebConnector n'a pas pu établir la connexion au serveur SICAT**

Ce chapitre montre uniquement les captures d'écran pour le cas où il n'y a aucune connexion Internet disponible.

Le paragraphe Causes indique des étapes possibles pour éliminer le problème.

Sinon, vous pouvez télécharger une commande sur un autre ordinateur avec une connexion Internet active par un navigateur Web à des fins de dépannage. En cas de commande par navigateur Web, SICAT Suite exporte tous les produits du panier à la fois, et crée un sous-dossier par patient. Chaque sous-dossier comprend un fichier XML avec les informations concernant la commande et une archive Zip avec les données dont SICAT a besoin pour la production. Vous pouvez ensuite télécharger consécutivement le fichier XML et l'archive Zip dans SICAT Portal. Le transfert est crypté.

Procédez de la manière suivante pour terminer la commande sans connexion Internet active :


- L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute n'est pas équipé d'une connexion Internet active.
- Une fenêtre affiche le message suivant : **Erreur lors de la connexion au serveur SICAT**



1 Bouton **Charger depuis un autre ordinateur**

1. Cliquez sur le bouton **Charger depuis un autre ordinateur**.

► La fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur** s'ouvre :

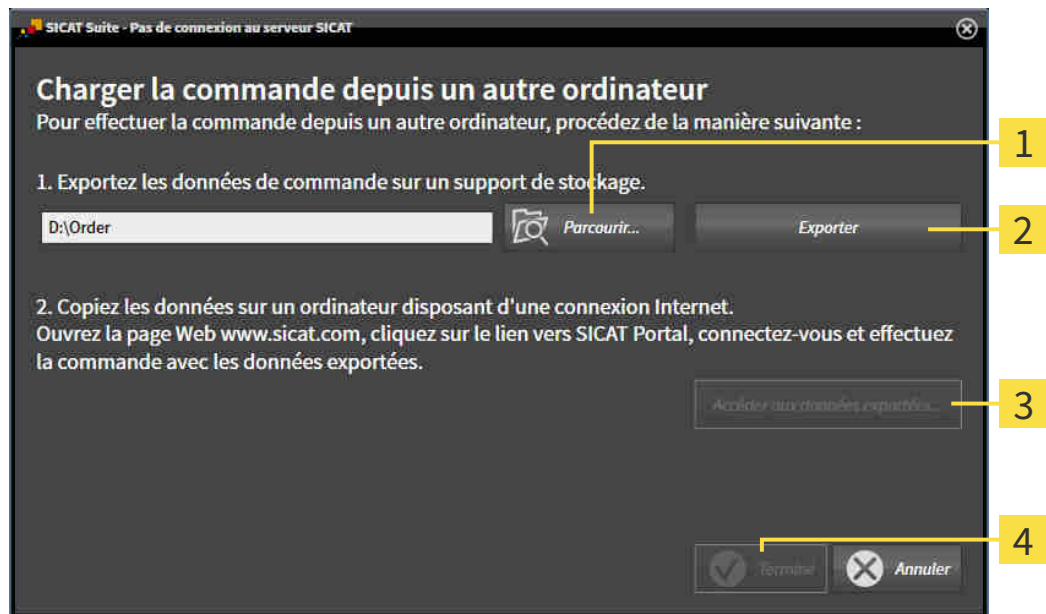

1 Bouton **Parcourir**


3 Bouton **Accéder aux données exportées**

2 Bouton **Exporter**

4 Bouton **Terminé**

2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
3. Sélectionnez un répertoire existant ou créez un nouveau répertoire puis cliquez sur **OK**. Veuillez noter que le chemin du répertoire ne doit pas dépasser 160 caractères.
4. Cliquez sur le bouton **Exporter**.
 - SICAT Suite exporte vers le dossier sélectionné tous les fichiers qui sont nécessaires pour la commande du contenu du panier. Ce faisant, SICAT Suite crée un sous-dossier pour chaque patient.
5. Cliquez sur le bouton **Accéder aux données exportées**.

- ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre, qui affiche le répertoire avec les données exportées :

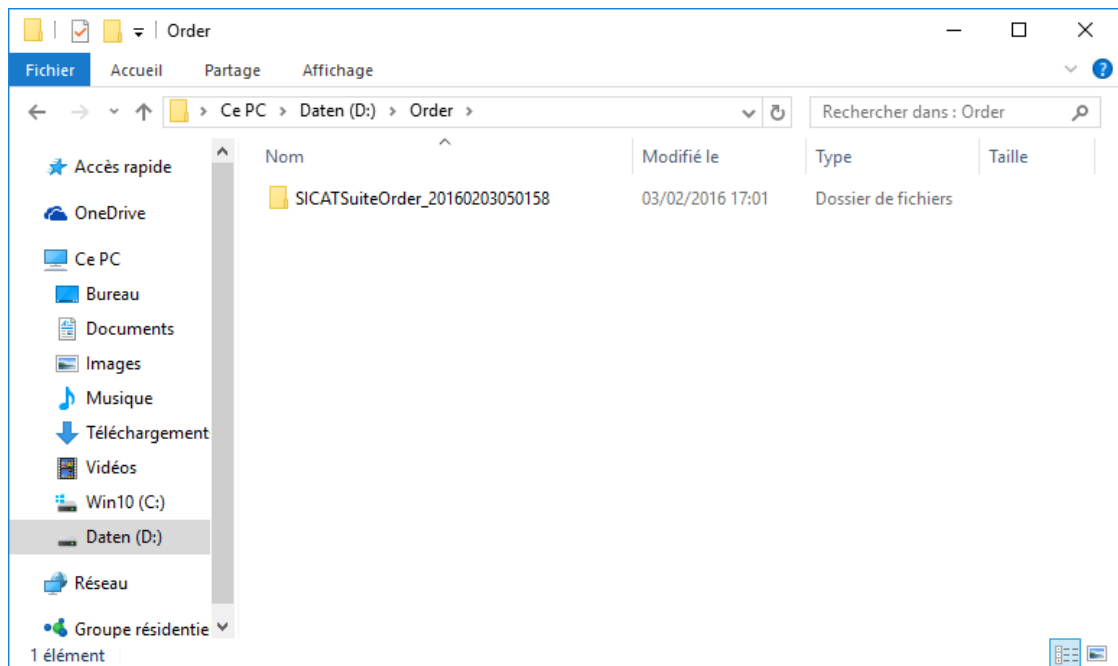

6. Copiez le dossier contenant les données de la gouttière souhaitée sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active, par exemple par l'intermédiaire d'une clé USB.
7. Dans la fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur**, cliquez sur **Terminé**.
 - ▶ SICAT Suite ferme la fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur**.
 - ▶ SICAT Suite supprime du panier tous les produits contenus dans la commande.
8. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.de>.
9. Cliquez sur le lien vers SICAT Portal.
 - ▶ SICAT Portal s'ouvre.
10. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
11. Cliquez sur le lien pour télécharger la commande.
12. Sélectionnez la commande voulue sur l'ordinateur équipé de la connexion Internet active. Il s'agit d'un fichier XML dont le nom commence par **SICATSuiteOrder**.
 - ▶ La vue d'ensemble de votre commande s'ouvre et affiche le patient contenu, les produits correspondants ainsi que le prix.
13. Suivez les instructions dans *Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal* [▶ Page 169 - *SIDEXIS XG*].
14. Cliquez sur le lien pour télécharger les données de planification du produit.

15. Sélectionnez les données de produits sur l'ordinateur équipé de la connexion Internet active. Il s'agit d'une archive ZIP qui se trouve dans le même dossier que le fichier XML précédemment chargé et dont le nom commence par **SICATSuiteExport**.
- Si vous avez exécuté la commande, votre navigateur transfère l'archive contenant les données de produits sur le serveur SICAT via une liaison cryptée.



SICAT Suite ne supprime pas automatiquement les données exportées. Une fois un processus de commande terminé, il est recommandé de supprimer manuellement les données exportées, dans un souci de sécurité.

33 RÉGLAGES



Les versions de SICAT Suite liées à SIDEXIS reprennent de nombreux réglages de SIDEXIS. Vous pouvez visualiser les valeurs de ces réglages dans SICAT Fonction, mais vous ne pouvez les modifier que dans les réglages de SIDEXIS.

Vous pouvez modifier ou visualiser les réglages généraux dans la fenêtre **Réglages**. Après que vous avez cliqué sur l'icône **Réglages**, la barre d'options sur le côté gauche de la fenêtre **Réglages** affiche les onglets suivants :

- **Généralités** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utiliser les réglages généraux* [► Page 177 - SIDEXIS XG].
- **Licences** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 43 - SIDEXIS XG].
- **Cabinet** - Visionner ou modifier le logo et le texte d'information de votre cabinet, par ex. pour leur utilisation sur les imprimés. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utiliser les informations sur le cabinet* [► Page 181 - SIDEXIS XG].
- **Visualisation** - Modifier les réglages de visualisation généraux. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 182 - SIDEXIS XG].
- **SICAT Function** - Modifier les réglages spécifiques à une application de SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier les réglages de SICAT Function* [► Page 184 - SIDEXIS XG].

Si vous modifiez les réglages, SICAT Function prend en charge immédiatement les modifications et enregistre les réglages dans votre profil d'utilisateur.

33.1 UTILISER LES RÉGLAGES GÉNÉRAUX



Les versions de SICAT Suite liées à SIDEXIS reprennent de nombreux réglages de SIDEXIS. Vous pouvez visualiser les valeurs de ces réglages dans SICAT Function, mais vous ne pouvez les modifier que dans les réglages de SIDEXIS.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir les réglages généraux :




1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Réglages**.

► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Généralités**.

► La fenêtre **Généralités** s'ouvre :

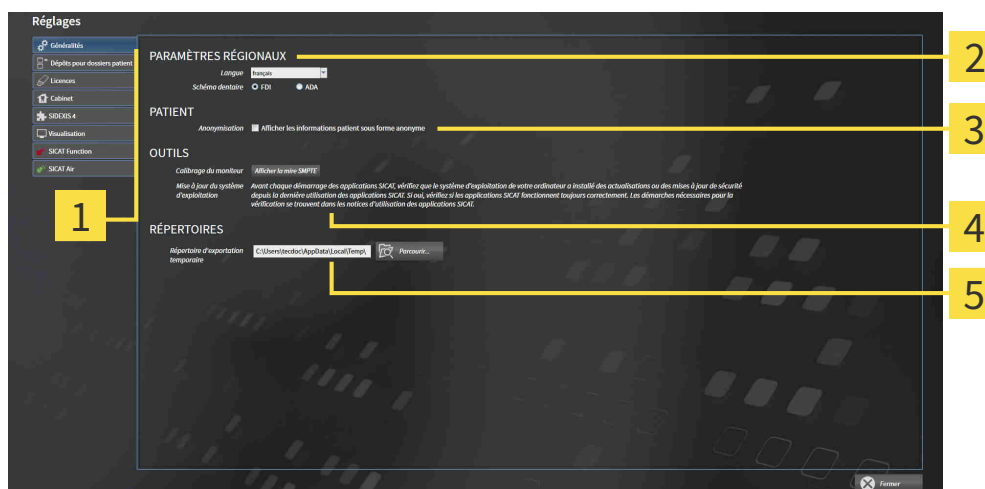

1 Onglet **Généralités**

4 Zone **OUTILS**

2 Zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**

5 Zone **RÉPERTOIRES**

3 Zone **PATIENT**

SICAT Function reprend les réglages suivants de SIDEXIS, que vous pouvez visualiser ici :

- Dans la zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**, vous pouvez visualiser la langue de l'interface utilisateur dans la liste **Langue**.
- Dans la zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**, vous pouvez visualiser le schéma dentaire actuel sous **Schéma dentaire**.
- Dans la zone **PATIENT**, vous pouvez visualiser l'état de la case à cocher **Afficher les informations patient sous forme anonyme**. Lorsque la case est cochée, SICAT Function reprend les données patient anonymisées de SIDEXIS.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- Dans la zone **RÉPERTOIRES**, vous pouvez indiquer dans le champ **Répertoire d'exportation temporaire** un dossier dans lequel SICAT Suite enregistre les données de commande. Vous devez disposer d'un accès sans restriction à ce dossier.

En plus de visionner ou de modifier les réglages généraux, il vous est également possible d'ouvrir la mire SMPTE pour calibrer votre moniteur :

- Cliquez sous **OUTILS** **Calibrage du moniteur**, sur le bouton **Afficher la mire SMPTE**, afin de calibrer votre moniteur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE* [▶ Page 179 - SIDEXIS XG].



Si vous sélectionnez dans SIDEXIS une langue que SICAT Function ne prend pas en charge, SICAT Function affiche les textes de l'interface utilisateur en anglais.



Si vous modifiez la langue dans SIDEXIS XG, vous devez redémarrer SICAT Suite pour que la modification soit appliquée.



Les schémas dentaires pris en charge sont FDI et ADA.

33.2 CALIBRAGE DU MONITEUR AVEC LA MIRE SMPTE

ATTENTION




Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

Quatre propriétés principales déterminent si votre moniteur est apte à visualiser les données dans les applications SICAT :

- Luminosité
- Contraste
- Résolution spatiale (linéarité)
- Distorsion (aliasing)

La mire SMPTE est une image de référence qui vous permet de contrôler les propriétés de votre moniteur :

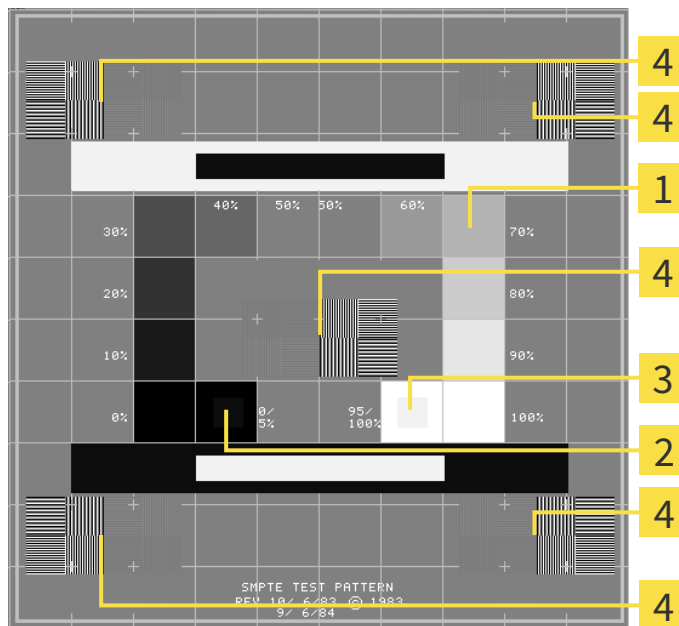

1 Carrés de niveaux de gris

3 Carré 100%

2 Carré 0%

4 Carrés contenant un motif de traits à contraste élevé

CONTRÔLER LA LUMINOSITÉ ET LE CONTRASTE

Au centre de la mire SMPTE, une rangée de carrés indique les niveaux de gris de noir (luminosité 0 %) à blanc (luminosité 100 %) :

- Le carré 0% contient un plus petit carré servant à indiquer la différence de luminosité entre 0 % et 5 %.
- Le carré 100 % contient un plus petit carré servant à indiquer la différence de luminosité entre 95 % et 100 %.

Procédez de la manière suivante pour contrôler ou régler votre moniteur :

La mire SMPTE est déjà ouverte.

- Contrôlez si vous pouvez observer la différence visuelle entre le carré intérieur et le carré extérieur dans les carrés 0 % et 100 %. Si nécessaire, modifiez les réglages de votre moniteur.



De nombreux moniteurs peuvent uniquement visualiser la différence de luminosité dans le carré 100 % et pas dans le carré 0 %. Vous pouvez réduire la lumière ambiante afin d'améliorer le pouvoir de distinction des différents niveaux de luminosité dans le carré 0 %.

CONTRÔLER LA RÉOLUTION SPATIALE ET LA DISTORSION

Dans les coins et au centres de la mire SMPTE, 6 carrés affichent un motif de traits à contraste élevé. En ce qui concerne la résolution spatiale et la distorsion, vous devez être en mesure de distinguer entre des lignes horizontales et verticales, de différentes largeurs, alternant le noir et le blanc :

- du plus large au plus étroit (6 pixels, 4 pixels, 2 pixels)
- horizontal et vertical

Procédez de la manière suivante pour contrôler ou régler votre moniteur :

- Contrôlez si vous distinguez toutes les lignes dans les 6 carrés affichant le motif de traits de contraste élevé. Si nécessaire, modifiez les réglages de votre moniteur.

FERMER LA MIRE SMPTE

Procédez de la manière suivante pour fermer la mire SMPTE :

- Appuyez sur la touche **Échap**.
- La mire SMPTE se ferme.

33.3 UTILISER LES INFORMATIONS SUR LE CABINET

Les versions de SICAT Suite liées à SIDEXIS reprennent le logo du cabinet et le texte d'information de SIDEXIS. Par conséquent, vous pouvez uniquement visualiser les valeurs de ces réglages dans SICAT Suite. Veuillez modifier ces réglages dans SIDEXIS le cas échéant.

Les applications de SICAT Suite utilisent le logo ainsi que les informations affichées ici pour individualiser les imprimés ou les fichiers PDF.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir les informations sur le cabinet :




1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Réglages**.

► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Cabinet**.

► La fenêtre **CABINET** s'ouvre :

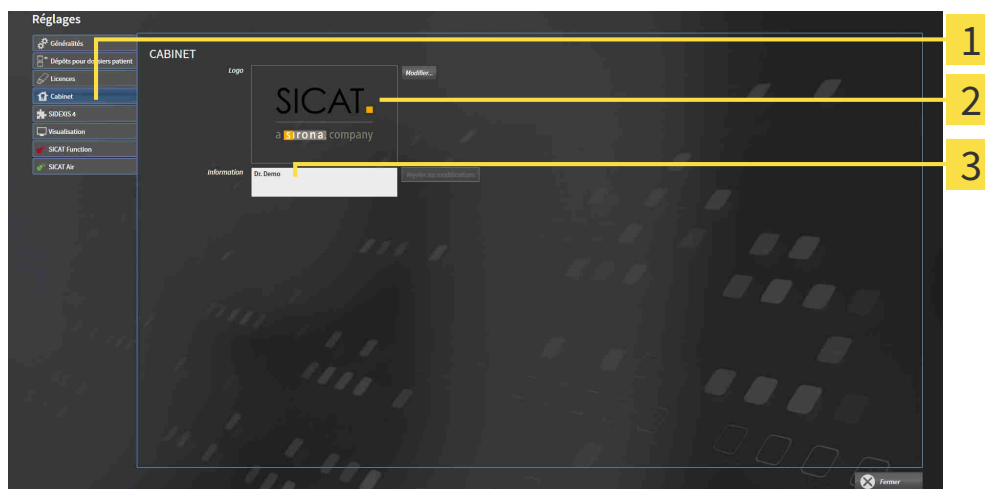

1 Onglet **Cabinet**

2 Zone **Logo**


3 Zone **Information**

Vous pouvez visualiser les réglages suivants :

- Dans la zone **Logo**, vous pouvez visualiser le logo de votre cabinet.
- Dans la zone **Information**, vous pouvez visualiser un texte identifiant votre cabinet, p. ex. le nom et l'adresse.

33.4 MODIFIER LES RÉGLAGES DE VISUALISATION

ATTENTION  **Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.**
 Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.

ATTENTION  **Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.**

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

Les réglages de visualisation définissent la visualisation du volume, des objets de diagnostic et des objets de planification dans toutes les applications SICAT.


Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Visualisation** :



1. Cliquez sur l'icône **Réglages**.
 ► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Visualisation**.
 ► La fenêtre **Visualisation** s'ouvre :

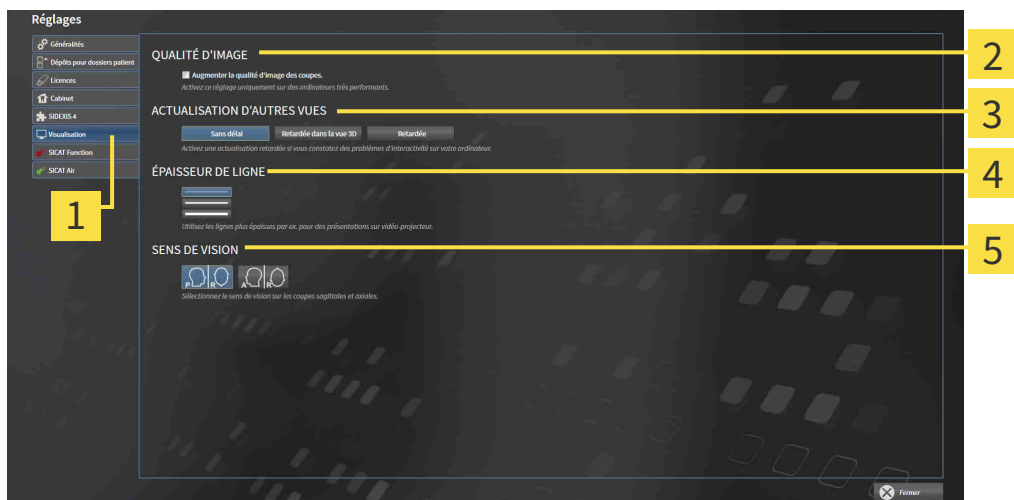

- | | |
|--|---|
| 1 Onglet Visualisation | 4 Zone ÉPAISSEUR DE LIGNE |
| 2 Zone QUALITÉ D'IMAGE | 5 Zone SENS DE VISION |
| 3 Zone ACTUALISATION D'AUTRES VUES | |

Les réglages suivants sont disponibles :

- **Augmenter la qualité d'image des coupes** - Améliore la qualité de représentation des coupes, par moyennage des coupes voisines, par le logiciel. Activez ce réglage uniquement sur des ordinateurs très performants.
- **ACTUALISATION D'AUTRES VUES** - L'actualisation retardée améliore l'interactivité de la vue active, au prix d'une actualisation retardée des autres vues. N'activez l'actualisation retardée que si vous constatez des problèmes d'interactivité sur votre ordinateur.
- **ÉPAISSEUR DE LIGNE** - Modifie l'épaisseur des lignes. Des lignes plus épaisses sont utiles pour des présentations sur vidéo-projecteur.
- **SENS DE VISION** - Commute le sens de vision de la vue de coupe **Axial** et de la vue de coupe **Sagittal**.

33.5 MODIFIER LES RÉGLAGES DE SICAT FUNCTION

SICAT Function Les réglages définissent la synchronisation Panoramique et la synchronisation Zoom dans l'espace de travail **TMJ** de SICAT Function.


Procédez de la manière suivante pour modifier les réglages de SICAT Function :



1. Cliquez sur l'icône **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **SICAT Function**.
▶ La fenêtre **SICAT Function** s'ouvre :

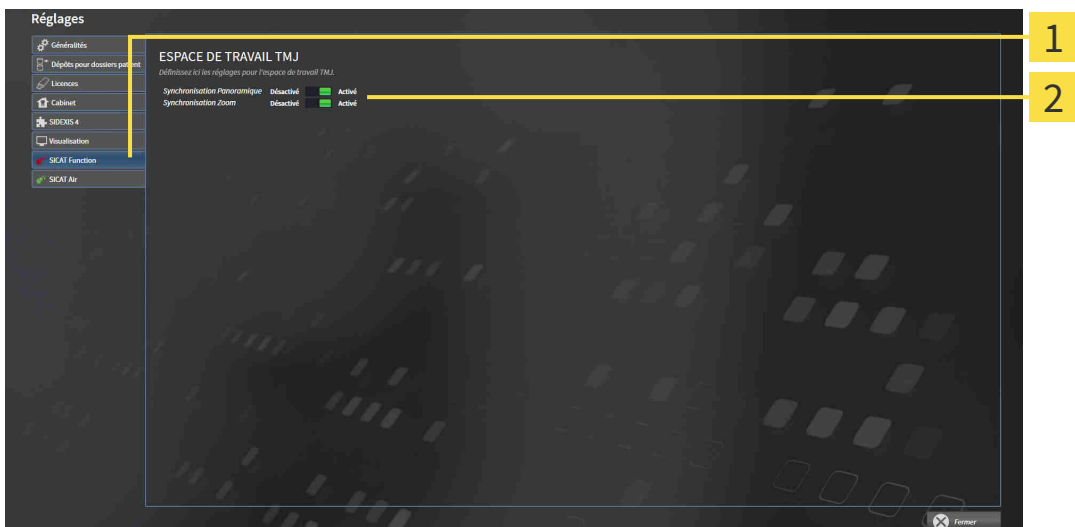

1 Onglet **SICAT Function**

2 Zone **Définissez ici les réglages pour l'espace de travail TMJ**

Les réglages suivants sont disponibles :

- **Synchronisation Panning**
- **Synchronisation Zoom**

Les réglages vous permettent d'activer ou de désactiver le fait que SICAT Function synchronise la panoramisation ou le zoom des vues dans l'espace de travail **TMJ** entre le condyle gauche et le condyle droit.


34 ASSISTANCE

SICAT offre les possibilités d'assistance suivantes :

- Documents PDF
- Informations de contact
- Informations sur le logiciel SICAT Suite installé et les applications SICAT installées

Poursuivez avec l'action suivante :

- Ouvrir les possibilités d'assistance [▶ Page 186 - SIDEXIS XG]

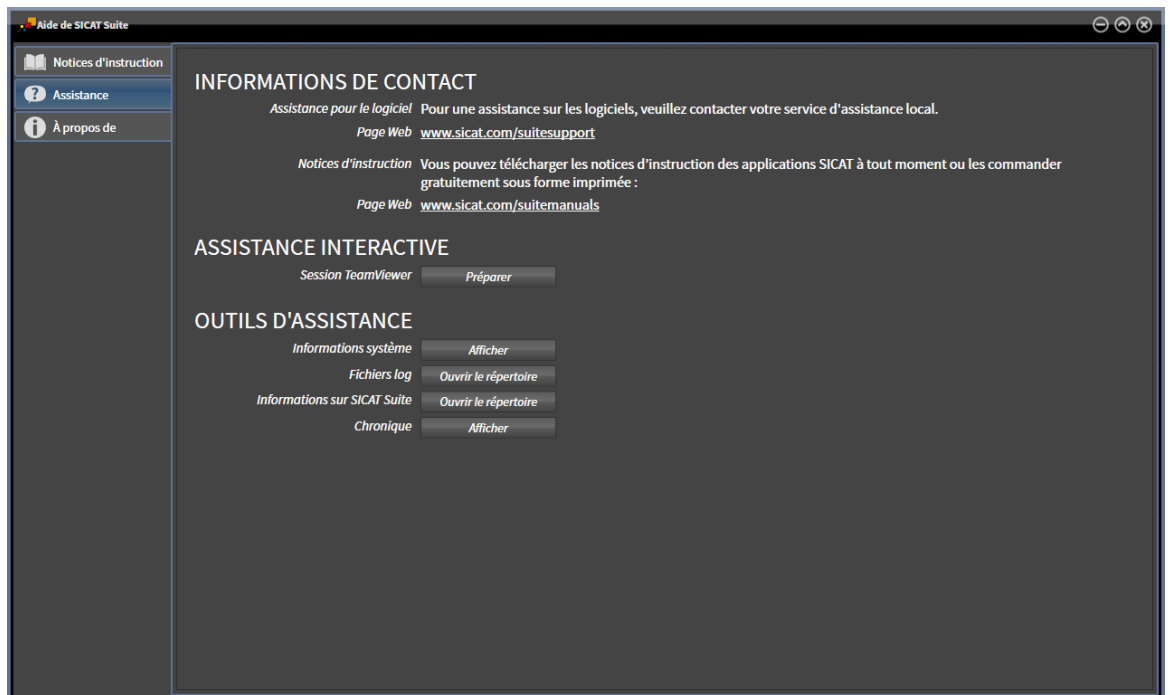

34.1 OUVRIR LES POSSIBILITÉS D'ASSISTANCE



Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Assistance** en cliquant sur l'icône **Assistance** dans la **Barre de navigation** ou en appuyant sur la touche F1.

La fenêtre **Assistance** de SICAT Suite se compose des onglets suivants :



- **Notice d'instruction** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir les instructions de service* [▶ Page 42 - SIDEXIS XG].




- **Assistance** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Informations de contact et outils d'assistance* [▶ Page 187 - SIDEXIS XG].



- **Info** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Info* [▶ Page 188 - SIDEXIS XG].

34.2 INFORMATIONS DE CONTACT ET OUTILS D'ASSISTANCE

La fenêtre **Assistance** contient l'ensemble des informations et des outils utiles à l'assistance SICAT :

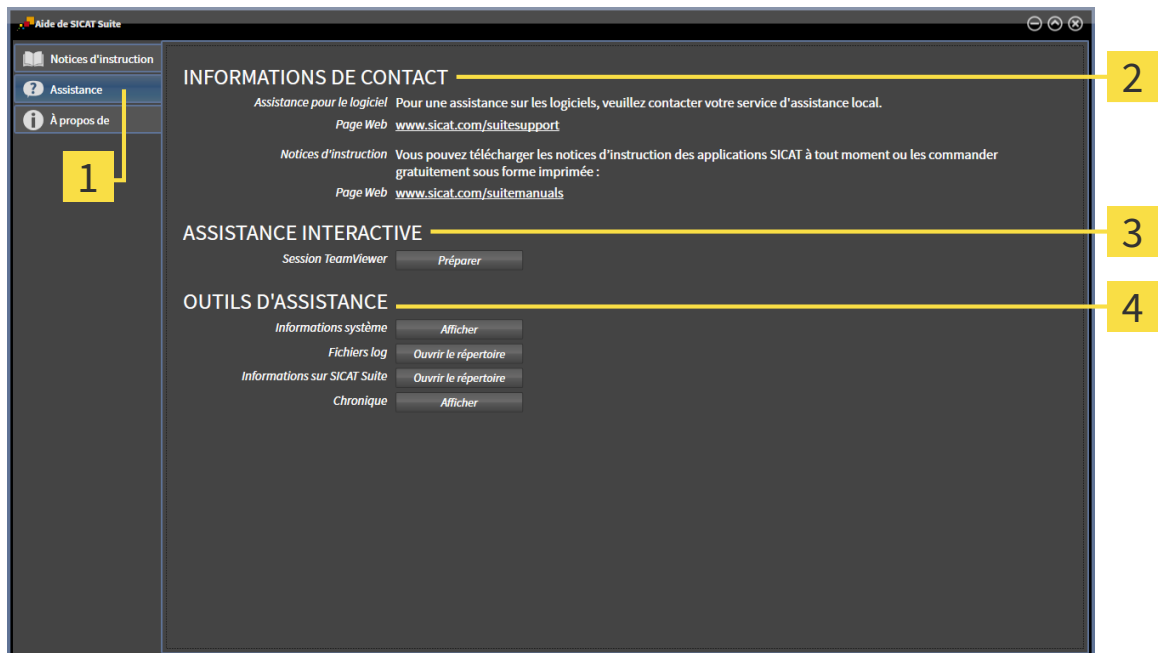

1 Onglet **Assistance**

3 Zone **ASSISTANCE INTERACTIVE**

2 Zone **INFORMATIONS DE CONTACT**

4 Zone **OUTILS D'ASSISTANCE**

La zone **INFORMATIONS DE CONTACT** vous indique comment vous procurer des notices d'instruction.

Les outils suivants sont disponibles dans la zone **ASSISTANCE INTERACTIVE** :

- Lorsque vous cliquez dans la zone **Session TeamViewer** sur le bouton **Préparer**, SICAT Fonction, ouvre une session TeamViewer.


TeamViewer est un logiciel permettant de télécommander les commandes de la souris et du clavier et de transférer le contenu de l'écran d'un ordinateur via une connexion Internet active. TeamViewer n'établit la connexion qu'avec votre accord explicite. À cet effet, vous communiquez à l'assistance SICAT un ID TeamViewer et un mot de passe. L'assistance SICAT est ainsi en mesure de vous aider directement sur site.

Les outils suivants sont disponibles dans la zone **OUTILS D'ASSISTANCE** :

- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations système** sur le bouton **Afficher**, SICAT Fonction, ouvre les informations du système d'exploitation.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Fichiers log** sur le bouton **Ouvrir le répertoire**, SICAT Fonction ouvre le répertoire log de SICAT Suite dans une fenêtre de l'explorateur de fichiers Windows.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations sur SICAT Suite** sur le bouton **Ouvrir le répertoire**, SICAT Fonction exporte des informations sur l'installation actuelle dans un fichier de texte.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations sur SICAT Suite** sur le bouton **Afficher les notifications** SICAT Fonction affiche la fenêtre des notifications.

34.3 INFO

La fenêtre **Info** affiche dans plusieurs onglets des informations sur SICAT Suite et sur toutes les applications SICAT installées :

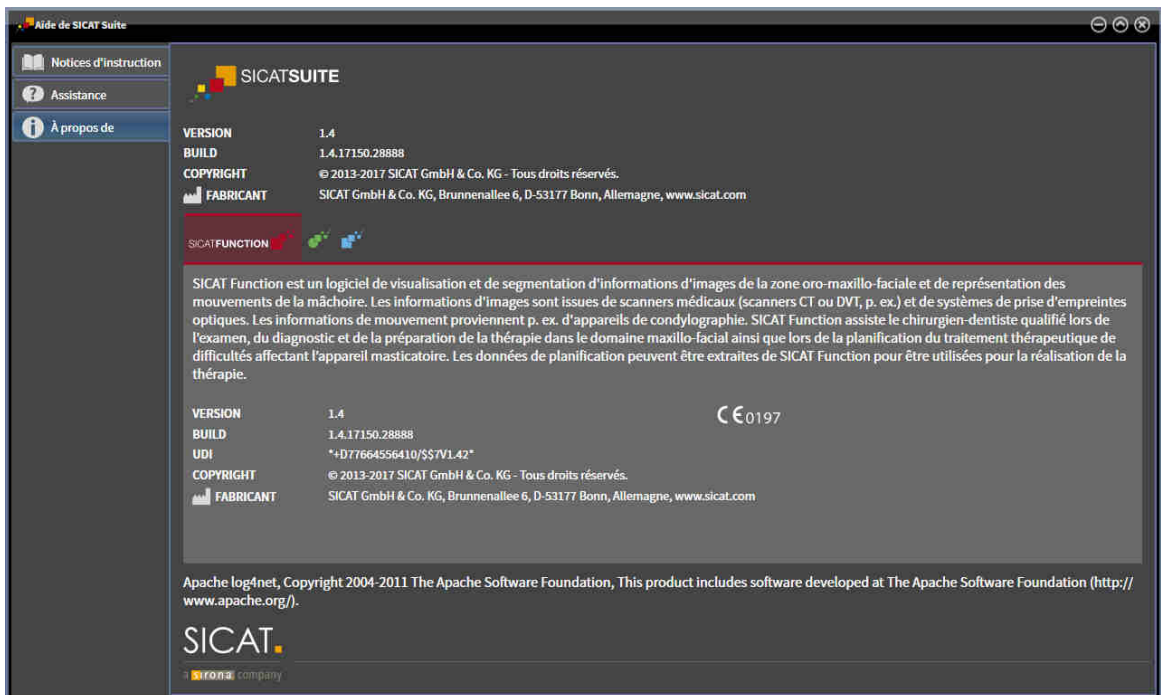

35 OUVRIR LES DONNÉES EN MODE DE LECTURE SEULE

Vous pouvez ouvrir les données en mode de lecture seule

Les données que vous pouvez visualiser dans SICAT Function en tant que plug-in SIDEXIS XG, sans possibilité de les modifier et de les enregistrer, dépendent du statut de la licence et de l'utilisation de la radiographie 3D actuelle :

TYPE DE LA LICENCE SICAT FUNCTION	UNE AUTRE STATION DE TRAVAIL SIDEXIS XG UTILISE LA RADIOGRAPHIE 3D ACTUELLE.	POSSIBILITÉ DE VISIONNER SANS MODIFIER ?
Aucune	Non pertinent	Non
Viewer	Non pertinent	Oui
Version complète	Oui	Oui
Version complète	Non	Non

Vous pouvez visionner les études SICAT Function aussi sans licence viewer dans les cas suivants :

- Exportez depuis SIDEXIS 4 des études SICAT Function et importez les données vers SIDEXIS sur un autre ordinateur. SICAT Function doit être installé sur cet ordinateur.
- Créez depuis SIDEXIS 4 un paquet Wrap&Go qui contient des études SICAT Function. Installez le paquet Wrap&Go sur un autre ordinateur. Installez ensuite SICAT Function.

Dans les deux cas, vous ne pouvez apporter ou enregistrer aucune modification sur la planification.



Vous trouverez des informations supplémentaires sur la prise en charge du mode multi-station de SIDEXIS XG dans la notice d'instruction de SIDEXIS XG.

Procédez de la manière suivante pour visualiser des données sans possibilité de les modifier et de les enregistrer :

1. Démarrez SICAT Suite avec une radiographie 3D depuis Sirona SIDEXIS XG. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Démarrer SICAT Suite* [▶ Page 38 - SIDEXIS XG].
 - ▶ SICAT Suite ouvre la radiographie 3D et les projets de planification à partir de l'examen SIDEXIS XG actuel.
 - ▶ Si une autre station de travail SIDEXIS XG utilise la radiographie 3D, une fenêtre affichant le message suivant s'ouvre : **Le dossier patient est traité par un autre utilisateur et ne peut être ouvert qu'en mode lecture**
2. Dans la fenêtre de message, cliquez sur le bouton **Ouvrir en mode lecture**.
 - ▶ SICAT Suite ouvre la radiographie 3D et les projets de planification à partir de l'examen SIDEXIS XG actuel.



Les conditions suivantes doivent être remplies afin que vous puissiez adapter l'orientation du volume et la courbe panoramique:

- Vous avez activé une licence avec laquelle vous pouvez ouvrir des radiographies 3D ou des études SICAT Function Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [▶ *Page 43 - SIDEXIS XG*].
- Il existe des objets dans aucune étude afférente SICAT Function en mode de lecture seule pour la radiographie 3D ou d'une autre application SICAT qui seraient concernés par une modification de l'orientation du volume ou de la courbe panoramique.

Si les conditions ne sont pas remplies, SICAT Function désactive dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** les boutons et éléments de contrôle que vous pourriez utiliser à des fins de modification de l'orientation du volume ou de la courbe panoramique.

36 *FERMER SICAT SUITE*



- Dans le coin supérieur droit de SICAT Function, cliquez sur le bouton **Fermer**.
- ▶ Toutes les applications SICAT se ferment.
- ▶ SIDEXIS enregistre les projets de planification modifiés de toutes les applications SICAT qui s'exécutent en tant que version complète.

37 RACCOURCIS CLAVIER



Lorsque vous amenez le pointeur de la souris sur certaines fonctions, SICAT Function affiche le raccourci clavier entre parenthèses à côté de la désignation de la fonction.

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans toutes les applications SICAT :

RACCOURCIS CLAVIER	DESCRIPTION
A	Ajouter une mesure d'angle
D	Ajouter une mesure de distance
F	Focaliser l'objet actif
Ctrl + C	Copier le contenu de la vue active dans le presse-papiers
Ctrl + Z	Annuler la dernière dernière manipulation d'un objet
Ctrl + Y	Répéter la dernière manipulation annulée d'un objet
Suppr	Supprimer l'objet actif ou le groupe actif
Échap	Annuler l'action actuelle (par ex. l'ajout d'une mesure)
F1	Ouvrir la fenêtre Assistance , ouvrir les instructions de service lorsque l'application SICAT est activée

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans la fenêtre **Segmentation de la mandibule** de SICAT Function :

RACCOURCIS CLAVIER	DESCRIPTION
N	Navigation
M	Segmenter la mandibule
F	Segmenter les fosses
B	Segmenter l'arrière-plan

38 DÉSINSTALLER SICAT SUITE



Le programme de désinstallation de SICAT Suite conserve toutes les licences actives sur votre ordinateur. C'est pourquoi le programme d'installation de SICAT Suite vous avertit avant la désinstallation qu'il ne supprime pas automatiquement les licences. Si vous ne souhaitez plus utiliser SICAT Suite sur cet ordinateur, désactivez les licences avant la désinstallation. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 50 - SIDEXIS XG].



Avant de désinstaller SICAT Suite, assurez-vous que SICAT WebConnector a bien téléchargé toutes les commandes, car le programme de désinstallation ferme automatiquement SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *SICAT WebConnector* [► Page 170 - SIDEXIS XG].

Procédez de la manière suivante pour désinstaller SICAT Suite :

SICAT WebConnector a téléchargé toutes les commandes avec succès

1. Dans le **Panneau de configuration** de Windows, cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.

► La fenêtre **Programmes et fonctionnalités** s'ouvre.

2. Sélectionnez dans la liste l'entrée **SICAT Suite**, celle-ci contenant en outre la version de SICAT Suite.

3. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.

► Le programme de désinstallation démarre et la fenêtre **PROGRESSION** s'ouvre :



- Une fois la désinstallation terminée, la fenêtre **CONFIRMATION** s'ouvre :



4. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

- Le programme de désinstallation de SICAT Suite se ferme.



Pour ouvrir le programme de désinstallation de SICAT Suite, vous pouvez également lancer le programme d'installation sur un ordinateur sur lequel SICAT Suite est déjà installé.



Le programme de désinstallation de SICAT Suite appelle le programme de désinstallation de certains logiciels requis qui ont été installés avec SICAT Suite. Si d'autres applications installées ont besoin de ces logiciels, ils ne sont pas supprimés.

39 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RADIOGRAPHIES 3D



ATTENTION

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



ATTENTION

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Des appareils de radiographie non conformes à DICOM peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que des radiographies 3D d'appareils de radiographie munis d'une déclaration de conformité DICOM.

CONDITIONS DE VISUALISATION



ATTENTION

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.



ATTENTION

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

GESTION DES DONNÉES



ATTENTION

Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.



ATTENTION

La suppression des données originales peut entraîner une perte de données.

Ne supprimez pas les données originales après l'importation.



L'absence d'un procédé de sauvegarde des données des dépôts de dossiers patient peut entraîner la perte irrémédiable de données patient.

Assurez-vous qu'une sauvegarde périodique des données de tous les dépôts de dossiers patient est réalisée.



Lorsque vous supprimez des dossiers patient, toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification qui y sont contenus sont également supprimés.

Ne supprimez des dossiers patient que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des radiographies 3D, des projets de planification et des fichiers PDF qu'ils contiennent.



Les dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Ne supprimez des dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin de ces données.



Lorsque vous supprimez des radiographies 3D, tous les projets de planification qui en dépendent sont également supprimés.

Ne supprimez des radiographies 3D que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des projets de planification qui en dépendent.

RÉSEAU



L'enregistrement de données d'application SICAT dans un système de fichiers réseau non fiable peut entraîner la perte de données.

Assurez-vous, en coopération avec votre administrateur réseau, que les données d'application SICAT puissent être enregistrées en toute sécurité dans le système de fichiers réseau souhaité.



L'utilisation commune de SICAT Suite et des applications SICAT intégrées avec d'autres appareils d'un réseau d'ordinateurs ou d'un réseau de stockage peut entraîner des risques jusqu'alors inconnus pour les patients, les utilisateurs et d'autres personnes.

Assurez-vous que des règles soient établies au sein de votre établissement afin de déterminer, d'analyser et d'évaluer les risques liés à votre réseau.



Des risques nouveaux peuvent résulter de modifications de votre environnement réseau telles que des modifications de votre configuration réseau, la connexion d'appareils ou de composants supplémentaires à votre réseau, la déconnexion d'appareils ou de composants du réseau, ainsi que la mise à jour ou la mise à niveau d'appareils ou de composants du réseau.

Effectuez une nouvelle analyse des risques du réseau après chaque modification du réseau.

QUALIFICATION DES OPÉRATEURS



L'utilisation de ce logiciel par du personnel non qualifié peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

Seul des opérateurs qualifiés sont autorisés à utiliser ce logiciel.

SÉCURITÉ



Des failles de sécurité dans votre système informatique peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

1. Assurez-vous que votre établissement a adopté des directives permettant de détecter et d'éviter toute menace à la sécurité de votre environnement informatique.
2. Installez un antivirus à jour et exécutez-le.
3. Assurez-vous que les fichiers de définition de l'antivirus soient régulièrement mis à jour.



Un accès non autorisé à votre station de travail peut entraîner un risque pour la confidentialité et l'intégrité de vos données patient.

Limitez l'accès à votre station de travail aux personnes autorisées.



Des problèmes de cybersécurité peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

Si vous supposez l'existence de problèmes de cybersécurité de votre application SICAT, prenez immédiatement contact avec l'assistance.

INSTALLATION LOGICIELLE



En cas de modification du logiciel, celui-ci risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Ne procédez à aucune modification de l'installation du logiciel.
2. Ne supprimez et ne modifiez aucun composant compris dans le répertoire d'installation du logiciel.



Des supports d'installation endommagés peuvent entraîner l'échec de l'installation.

Manipulez les supports d'installation avec soin et entreposez-les de manière appropriée.



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.



Des autorisations insuffisantes peuvent entraîner l'échec de l'installation ou de la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous de disposer d'autorisations suffisantes sur votre système lorsque vous installez ou mettez à jour le logiciel.

COMMANDES



Des données de commande incorrectes peuvent entraîner une commande erronée.

Lorsque vous procédez à une commande, assurez-vous que vous sélectionnez et transmettez les données correctes pour cette commande.



Une commande erronée peut entraîner un traitement erroné.

1. Vérifiez votre commande avant de l'envoyer.
2. Confirmez la planification correcte de votre commande.

DONNÉES DE MOUVEMENT



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données de mouvement de la mâchoire d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination n'est pas appropriée peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination est conforme à l'utilisation des données de mouvement de la mâchoire par SICAT Function.



L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire non pris en charge ou d'appareils d'enregistrement non compatibles peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des données de mouvement de la mâchoire qui ont été acquises avec une combinaison supportée d'un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire (par exemple SICAT JMT*) et d'un appareil de recalage compatible (par exemple SICAT Fusion Bite).



ATTENTION

Une acquisition incorrecte des données de mouvement de la mâchoire et des radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que les données de mouvement de la mâchoire et les radiographies 3D ont été acquises conformément aux instructions des fabricants des appareils. Utilisez le type de corps de référence indiqué.



ATTENTION

Des données de mouvement de la mâchoire qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données de mouvement de la mâchoire correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données de mouvement de la mâchoire peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données de mouvement de la mâchoire importées.



ATTENTION

Une qualité, une précision et une résolution insuffisantes des données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données de mouvement de la mâchoire présentant une qualité, une résolution et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou une qualité insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec du mécanisme de détection des marqueurs et du corps de référence. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant la détection correcte des marqueurs et du corps de référence.



ATTENTION

Une position, un type et une orientation incorrects du corps de référence peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Après la détection du corps de référence par l'assistant JTM, contrôlez la position, le type et l'orientation corrects du corps de référence en tenant compte des radiographies 3D.



ATTENTION

Un recalage incorrect des données de mouvement de la mâchoire sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données de mouvement de la mâchoire recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

EMPREINTES OPTIQUES



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.



Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou des points manquants pour le recalage peuvent entraîner l'échec de la procédure de recalage d'empreintes optiques. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des empreintes optiques et des radiographies 3D permettant un recalage précis.



La sélection, dans le procédé de recalage d'empreintes optiques, de marquages qui ne coïncident pas peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Lorsque vous recalez des données d'empreintes optiques, sélectionnez soigneusement, dans les radiographies 3D et dans les empreintes optiques, des marquages qui coïncident.



ATTENTION

Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

SEGMENTATION



ATTENTION

Des artefacts excessifs ou une résolution insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec de la procédure de segmentation ou des résultats insuffisants. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant une qualité suffisante de la segmentation des structures anatomiques concernées.



ATTENTION

Une qualité insuffisante de la segmentation peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez que la qualité de la segmentation est suffisante pour l'utilisation prévue.

40 PRÉCISION

Le tableau suivant indique les valeurs de précision dans toutes les applications SICAT :

Précision des mesures de distances	< 100 µm
Précision des mesures d'angles	< 1 degré
Précision de la représentation	< 20 µm
Précision de la représentation pour les données de mouvement de la mâchoire	< 0,6 mm

GLOSSAIRE

ADA

American Dental Association (association dentaire américaine)

Application

Les applications SICAT sont des programmes qui font partie de SICAT Suite.

Barre de navigation

La barre de navigation dans la partie supérieure de SICAT Suite contient les icônes principales de SICAT Suite. Lorsqu'un dossier patient est actif, la barre de navigation permet de commuter entre le dossier patient et différentes applications.

Cadres

Dans la vue 3D, des cadres indiquent les positions des vues de coupes 2D.

Empreintes optiques

Une empreinte optique est le résultat d'une acquisition 3D de la surface de dents, de matériaux d'empreinte ou de modèles en plâtre.

FDI

Fédération Dentaire Internationale

Fenêtre de notification

La fenêtre de notification affiche sur le bord inférieur droit de l'écran des messages relatifs aux procédures terminées.

Fourchette occlusale

Une fourchette occlusale est une plaque à mordre munie de marqueurs radio-opaques sphériques, utilisée par SICAT pour fusionner les données de radiographies 3D avec les données de mouvement de la mâchoire.

Recalage

Orientation spatiale

Réticules

Les réticules sont des lignes d'intersection avec d'autres vues de coupes.

SICAT JMT+

SICAT JMT+ enregistre les mouvements de la mandibule.

SICAT Portal

SICAT Portal est un site Internet sur lequel vous avez la possibilité, entre autres, de commander des gouttières chez SICAT.

SIXD

Format de fichier pour l'échange d'empreintes optiques.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (Société des ingénieurs du cinéma et de la télévision)

SSI

Format de fichier pour l'échange d'empreintes optiques.

STL

Surface Tessellation Language, format de fichier standard pour l'échange de données de maillage, pouvant être contenues dans les empreintes optiques, par exemple.

INDEX

A		E	
Aperçu général de SICAT Suite	15	Empreintes optiques	117
Articulation anatomique	127	Importation STL	124
Assistance	185	Importer et enregistrer	119
Informations de contact	187	Réutiliser à partir d'autres applications SICAT	125
Informations produit	188	Enregistrer et supprimer le plug-in	
Outils	187	SIDEXIS XG	36
Ouverture de la fenêtre d'assistance	186	Espace de travail TMJ	65
Ouvrir l'aide	42	Afficher la limite de la segmentation	138
B		Afficher le mouvement axé sur les condyles	139
Barre d'outils de flux de travail	53	Déplacer les points de tracé	135
C		Fonctions	134
Calibrage du moniteur	179	Informations générales	64
Captures d'écran		Placer le point inter-incisif	136
Créer des espaces de travail	69	Utilisation du triangle de Bonwill	137
Captures d'écrans		Valeurs d'articulateur	140
Créer des vues	83	Espaces de travail	61
CEREC		Adapter	68
Valeurs d'articulateur	140	Barre d'outils de l'espace de travail	52
Commande	159	Changer	67
Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier	162	Créer des captures d'écran	69
Chargement automatique après le redémarrage	171	MPR/Radiologie	66
Contrôler le panier	167	Panorama	63
Définir la position thérapeutique	160	Réinitialiser	68
Écraser la position thérapeutique	161	TMJ	64
Interrompre et poursuivre le chargement	171	Étape de flux de travail	
SICAT Portal	169	Commander	54
Supprimer la position thérapeutique	160	Diagnostiquer	54
Transfert de données en arrière-plan	168	Préparer	53
Transmission de données par un autre ordinateur	172	Exportation de données	155
Commuter		Exporter des données	157
Applications	41	Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"	156
Commuter entre les applications	41	F	
Configuration système requise	8	Fenêtre d'examen	62
D		Fermer	191
Désinstallation	193	Flux de travail	33
Données de mouvement	104	I	
Appareils	105	Importation STL	124
Exporter	130	Informations relatives à la sécurité	10
Importer et enregistrer	107	Niveaux de danger	11
Sélectionner les relations intermaxillaires statiques		Qualification des opérateurs	12
ou les mouvements de la mâchoire.	129	Installation	17
Visionner les tracés de mouvements anatomiques	128	Désinstallation	193
		Interface utilisateur	
		SICAT Fonction	52
		SICAT Suite	39

L

Langues	15
Licences	43
Activation automatique	46
Activation manuelle	48
Afficher	45
Restituer au pool de licence	50
Utiliser des codes de bon d'échange	51

M

Mesures	
Ajouter des mesures d'angles	151
Ajouter des mesures de distances	150
Déplacer	153
Déplacer des points de mesure	153
Déplacer des valeurs de mesure	154
Vue d'ensemble	149
Mire SMPTE	179

N

Notice d'instruction	
Ouvrir comme aide en ligne	42
Symboles et styles	13
Vue d'ensemble	14

O

Objets	
Activer les objets et les groupes d'objets	56
Annuler et répéter	58
Barre d'objets	55
Barre d'outils d'objet	58
Focalisation	58
Masquer et afficher les objets et les groupes d'objets	57
Objets de SICAT Function	59
Réduire et développer les groupes d'objets	56
Supprimer	58
Orientation du volume	94
Adapter	96
Ouvrir les données en mode de lecture seule	189

P

Panier d'achat	
Ouvrir	166
Particularités de cette version	30
Premières étapes	33

R

Raccourcis clavier	192
Réglages	176
Modifier les réglages de visualisation	182
Modifier ou visualiser les réglages généraux	177

Visionner ou modifier les informations du cabinet	181
Visionner ou modifier les réglages de SICAT Function	184

S

Segmentation	111
Segmenter la mandibule	112
Segmenter les fosses	114
Segmenter la mandibule	112
Segmenter les fosses	114
SICAT Function	
Interface utilisateur	52
SICAT Portal	169
SICAT Suite	
Démarrer	38
Fermer	191
Interface utilisateur	39
SICAT WebConnector	170
SIDEXIS XG	
Enregistrer et supprimer le plug-in	36

T

Tracés	127
Adapter avec la fenêtre d'examen	132
Adapter avec le réticule	133
Représenter dans la vue 3D	131

U

Utilisation conforme	6
Utiliser des codes de bon d'échange	51


V

Valeurs d'articulateur	
Informations générales	140
Relevé avec des condyles invisibles	146
Relevé avec des condyles visibles	144
Versions	
Différences	30
Vue 3D	84
Commuter le type de représentation	89
Configurer	90
Déplacer l'extrait	92
Modifier le sens de vision	85
Types de représentation	87
Vues	70
Barre d'outils de vue	71
Commuter	73
Contraste et luminosité	75
Créer des captures d'écran	83
Déplacer des extraits	77
Déplacer la fenêtre d'examen	80
Faire défiler	78
Masquer et afficher la fenêtre d'examen	81

Maximiser et restaurer	74
Réinitialiser	82
Réticules et cadres	79
Zoomer	77

Z

Zone JMT	128
Gérer les signets	130
Zone panoramique	95
Adapter	101

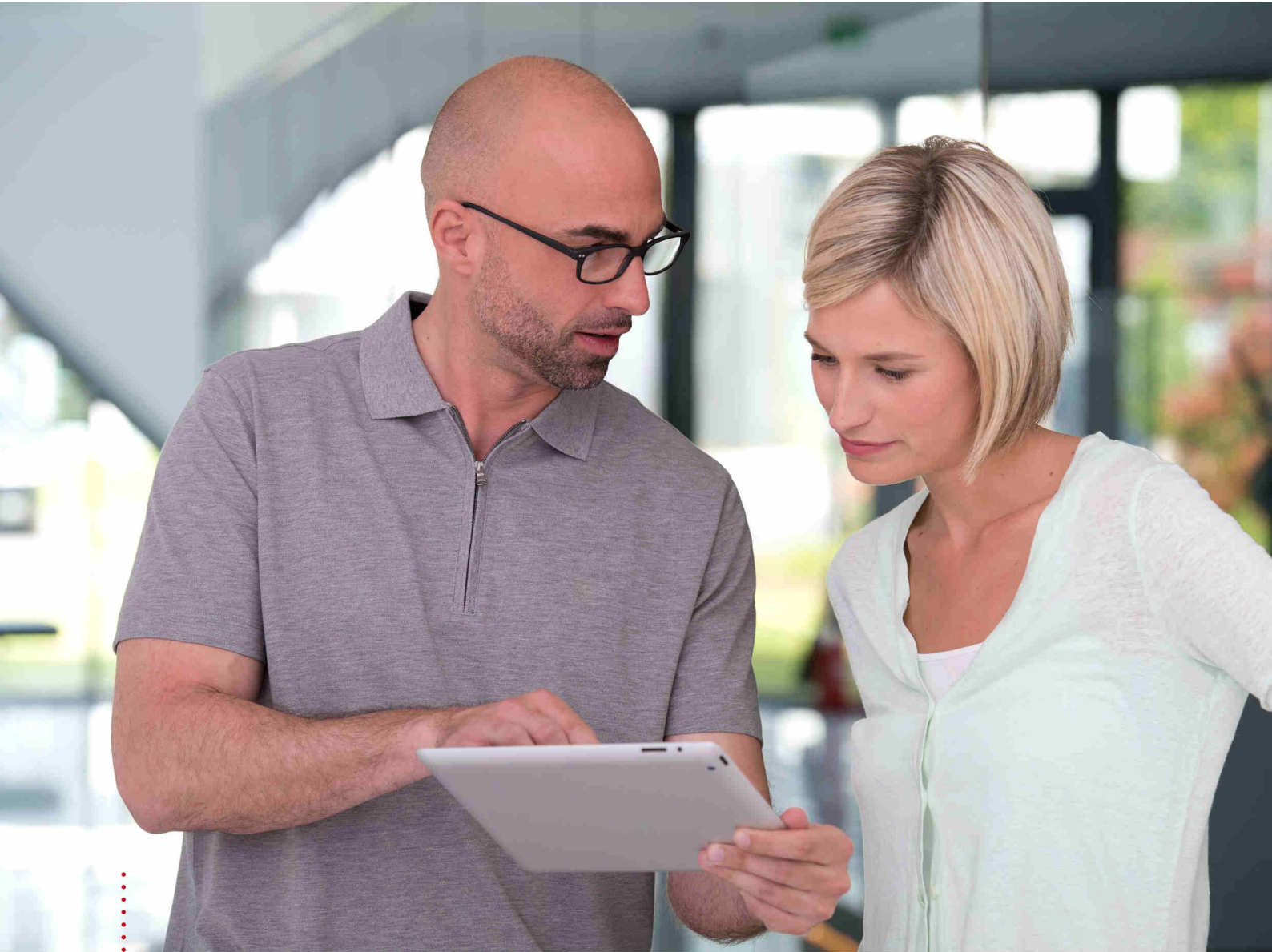

SICAT FUNCTION *VERSION 1.4*

Notice d'instruction | Français | Standalone

TABLE DES MATIÈRES - Standalone

1	Utilisation conforme	6
2	Historique des versions	7
3	Configuration système requise	8
4	Informations relatives à la sécurité	10
4.1	Définition des niveaux de danger	11
4.2	Qualification des opérateurs	12
5	Symboles et mises en relief utilisés	13
6	Vue d'ensemble de la notice d'instruction	14
7	Aperçu général de SICAT Suite	15
8	Installer SICAT Suite	17
9	Effectuez les étapes d'essai après la mise à jour du système d'exploitation	23
10	Actualiser ou réparer SICAT Suite	29
11	Particularités dans cette version	30
12	Flux de travail standard de SICAT Function	33
13	Démarrer SICAT Suite	37
14	Interface utilisateur de SICAT Suite	38
14.1	Vue d'ensemble de la fenêtre "SICAT Suite Home"	40
15	Commuter entre les applications SICAT	42
16	Ouvrir les instructions de service	43
17	Licences	44
17.1	Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"	46
17.2	Activer des licences via une connexion Internet active	47
17.3	Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active	49
17.4	Restituer des licences au pool de licences	51
17.5	Utiliser des codes de bon d'échange	52
18	Dépôts de dossiers patient	53
18.1	Ouvrir la fenêtre "Dépôts de dossiers patient"	55
18.2	Ajouter des dépôts de dossiers patient	56
18.3	Activer un autre dépôt de dossiers patient	58
18.4	Supprimer un dépôt de dossiers patient	60
19	Importation de données	61
19.1	Format DICOM supporté	63
19.2	Sélectionner les données à importer	64
19.3	Sélectionner une option d'importation	66
19.4	Créer un nouveau dossier patient par importation de données	67

19.5	Affecter les données à un dossier patient existant	68
20	Dossiers patient	71
20.1	Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"	72
20.2	Rechercher et trier les dossiers patient dans le dépôt.....	73
20.3	Activer les dossiers patient.....	75
20.4	Travailler avec des dossiers patient actifs.....	76
20.5	Modifier les attributs de dossiers patient	78
20.6	Ouvrir des radiographies 3D ou des projets de planification à partir de la vue d'ensemble des dossiers patient. 79	
20.7	Études SICAT Function dans SICAT Suite	81
20.8	Fermer un dossier de patient actif et enregistrer les projets de planification contenus	84
20.9	Supprimer des dossiers patient des dépôts	85
20.10	Supprimer des radiographies 3D ou des projets de planification de dossiers patient	87
21	Interface utilisateur de SICAT Function	89
21.1	Barre d'outils de flux de travail	90
21.2	Barre d'objets.....	92
21.3	Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets	93
21.4	Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet.....	95
21.5	Objets de SICAT Function	96
22	Espaces de travail.....	98
22.1	Vue d'ensemble de l'espace de travail Panorama	99
22.2	Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ.....	101
22.3	Vue d'ensemble de l'espace de travail MPR/Radiologie	103
22.4	Changer d'espace de travail actif.....	104
22.5	Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail	105
22.6	Créer des captures d'écran d'espaces de travail.....	106
23	Vues	107
23.1	Adaptation des vues	108
23.2	Changer de vue active.....	110
23.3	Maximiser et restaurer les vues.....	111
23.4	Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D.....	112
23.5	Zoomer les vues et déplacer des extraits	114
23.6	Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D.....	115
23.7	Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres.....	116
23.8	Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen	117
23.9	Réinitialiser les vues	119
23.10	Créer des captures d'écran de vues	120
24	Adaptation de la vue 3D	121
24.1	Modifier le sens de vision de la vue 3D.....	122
24.2	Types de représentation de la vue 3D.....	123
24.3	Commuter le type de représentation de la vue 3D.....	126

24.4	Configurer le type de représentation actif de la vue 3D.....	127
24.5	Déplacer l'extrait.....	129
25	Niveaux de gris.....	131
25.1	Adapter les niveaux de gris.....	133
26	Orientation du volume et zone panoramique	135
26.1	Adapter l'orientation du volume.....	137
26.2	Adapter la zone panoramique.....	142
27	Données de mouvement.....	145
27.1	Appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles	146
27.2	Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés.....	147
28	Segmentation	152
28.1	Segmenter la mandibule	153
28.2	Segmenter les fosses	155
29	Empreintes optiques.....	158
29.1	Importer et recalcr les empreintes optiques.....	159
29.2	Étapes supplémentaires pour les empreintes optiques en format STL.....	165
29.3	Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT.....	166
30	Articulation anatomique	168
30.1	Interagir avec les mouvements de la mâchoire	169
30.2	Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D.....	172
30.3	Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen.....	173
30.4	Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule.....	174
31	Fonctions de l'espace de travail TMJ	175
31.1	Déplacer les points de tracé	176
31.2	Placer le point inter-incisif.....	177
31.3	Utilisation du triangle de Bonwill.....	178
31.4	Afficher la limite de la segmentation	179
31.5	Afficher le mouvement axé sur les condyles	180
32	Valeurs d'articulateur	181
32.1	Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles visibles	185
32.2	Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles invisibles	187
33	Mesures de distances et d'angles	190
33.1	Ajouter des mesures de distances.....	191
33.2	Ajouter des mesures d'angles	192
33.3	Déplacer des mesures, des points de mesure et des valeurs de mesure	194
34	Exportation de données	196
34.1	Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"	197
34.2	Exporter des données.....	198
35	Processus de commande	200

35.1 Définir une position thérapeutique.....	201
35.2 Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier	203
35.3 Ouvrir le panier	207
35.4 Contrôler le panier et terminer la commande.....	208
35.5 Terminer une commande via une connexion Internet active	209
35.6 Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal.....	210
35.7 SICAT WebConnector.....	211
35.8 Terminer une commande sans connexion Internet active	213
36 Réglages	217
36.1 Utiliser les réglages généraux.....	218
36.2 Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE.....	220
36.3 Utiliser les informations sur le cabinet	222
36.4 Modifier les réglages de visualisation	223
36.5 Modifier les réglages de SICAT Function.....	225
37 Assistance	226
37.1 Ouvrir les possibilités d'assistance	227
37.2 Informations de contact et outils d'assistance	228
37.3 Info.....	229
38 Ouvrir les données en mode de lecture seule.....	230
39 Fermer SICAT Function.....	232
40 Fermer SICAT Suite	233
41 Raccourcis clavier.....	234
42 Désinstaller SICAT Suite	235
43 Consignes de sécurité	237
44 Précision.....	244
Glossaire.....	245
Index.....	246

1 UTILISATION CONFORME

SICAT Function est un logiciel de visualisation et de segmentation d'informations d'images de la zone oro-maxillo-faciale et de représentation des mouvements de la mâchoire.

Les informations d'images sont issues de scanners médicaux (scanners CT ou DVT, p. ex.) et de systèmes de prise d'empreintes optiques. Les informations de mouvement proviennent p. ex. d'appareils de condylographie.

SICAT Function assiste le chirurgien-dentiste qualifié lors de l'examen, du diagnostic et de la préparation de la thérapie dans le domaine maxillo-facial ainsi que lors de la planification du traitement thérapeutique de difficultés affectant l'appareil masticatoire.

Les données de planification peuvent être extraites de SICAT Function pour être utilisées pour la réalisation de la thérapie.

2 HISTORIQUE DES VERSIONS

VERSION 1.4

- Pour des raisons réglementaires, les applications SICAT nécessitent une licence également pour le mode viewer. Des applications sans une licence ne sont pas disponibles. SICAT ajoute automatiquement à votre code d'activation client des licences viewer d'applications qui sont autorisées dans votre pays. Vous pouvez activer les licences viewer en désactivant puis réactivant n'importe quelle licence. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 44 - Standalone].
- Les instructions de service sont également disponibles dans la version standalone et dans plug-in SIDEXIS XG sous la forme de fichiers PDF.
- SICAT Function un axe virtuel peut être calculé à l'aide de données de mouvement de la mâchoire.
- SICAT Function indique les longueurs du côté du triangle de Bonwill.

VERSION 1.3

- Module SIDEXIS 4
- Prise en charge des langues italienne, espagnole, portugaise, néerlandaise et russe
- Le numéro de version de SICAT Function correspond maintenant au numéro de version de SICAT Suite.
- Commande de gouttières thérapeutiques également possible via la fabrication d'un modèle en plâtre.
- **TMJ**Espace de travail visualisant les mouvements des condyles segmentés.
- La segmentation peut être traitée après fermeture de la fenêtre de segmentation.

VERSION 1.1

- Prise en charge des langues française et japonaise
- Correction de l'orientation du volume
- Commande de gouttières thérapeutiques OPTIMOTION
- Modification du format des données de mouvement de la mâchoire en fichiers .jmt
- Exportation des empreintes optiques avec tracés des mouvements intégrés

VERSION 1.0

- Version initiale
- Prise en charge des langues anglaise et allemande

3 CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.

Processeur	Quad Core 2,3 GHz
Mémoire de travail	8 Go
Carte graphique	Dédiée* DirectX 11 ou version supérieure Mémoire graphique 2 Go Pilote actuel avec prise en charge de WDDM 1.0 au minimum
Écran	Résolution minimale 1 920 x 1 080 pixels avec un niveau de mise à l'échelle de 100 à 125 pour cent** Résolution maximale 3 840 x 2 160 pixels avec un niveau de mise à l'échelle de 100 à 200 pour cent**
Espace libre sur le disque dur	20 Go et un espace supplémentaire pour les jeux de données
Supports de stockage	Accès au support de stockage externe contenant les fichiers d'installation.
Périphériques d'entrée	Clavier, souris
Réseau	Ethernet, 100 Mbit/s, 1 000 Mbit/s recommandé
Imprimante pour l'information du patient	Minimum 300 dpi Format de papier DIN A4 ou lettre US
Système d'exploitation	Windows 7 SP1 (64 bits) avec KB2670838 Windows 8 (64 bits, Desktop) Windows 8.1 (64 bits, Desktop) Windows 10 (64 bits, Desktop)
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer 11 ou version supérieure Mozilla Firefox 39 ou version supérieure Google Chrome 44 ou version supérieure JavaScript doit être activé. Un navigateur standard doit être réglé.

Viewer PDF	Par exemple Adobe Reader DC ou version supérieure
SIDEXIS XG avec SICAT Suite en tant que plug-in	Version 2.6.1 (64 bits)
SIDEXIS 4 avec SICAT Suite en tant que module	Version 4.2 SiPlanAPI V4
SIDEXIS 4 avec SICAT Suite en tant que plug-in	Version 4.1.2 (64 bits)



*SICAT Suite ne prend en charge que des cartes graphiques dédiées à partir du niveau de performance de NVIDIA GeForce 960 GTX. Les cartes graphiques intégrées ne sont pas prises en charge.

**La combinaison entre une résolution d'écran faible et un niveau de mise à l'échelle élevé peut entraîner une visualisation incomplète de certaines parties de l'interface utilisateur par le logiciel.

L'écran doit être réglé de manière à afficher correctement la mire SMPTE. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE* [► Page 220 - Standalone].

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE

SICAT Suite requiert les composants logiciels suivants et les installe au cas où ils ne le seraient pas encore :

- Microsoft .NET Framework 4.5
- Logiciel de gestion de licence CodeMeter 6.30d
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

Le SICAT WebConnector nécessite des ports déterminés pour la communication avec le serveur SICAT. Les ports doivent être validés dans votre pare-feu :

PROTOCOLE	SENS DE LA CONNEXION	PORT
HTTP	Sortant	80
HTTPS	Sortant	443
FTPS - Gestion	Sortant	21
FTPS - Transmission de données	Sortant	49152-65534



Vous pouvez aussi commander sans le SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [► Page 200 - Standalone].

4 *INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ*

Il est essentiel que vous lisiez les chapitres suivants relatifs à la sécurité :

- *Définition des niveaux de danger* [▶ Page 11 - Standalone]
- *Qualification des opérateurs* [▶ Page 12 - Standalone]
- *Consignes de sécurité* [▶ Page 237 - Standalone]

4.1 DÉFINITION DES NIVEAUX DE DANGER

La présente notice d'instruction fait appel aux marquages de sécurité suivants pour éviter les blessures aux opérateurs et aux patients ainsi que les dommages matériels :

**ATTENTION**

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures légères si rien n'est fait pour l'éviter.

REMARQUE

Indique des informations importantes qui ne conditionnent toutefois pas la sécurité.

4.2 QUALIFICATION DES OPÉRATEURS



ATTENTION

L'utilisation de ce logiciel par du personnel non qualifié peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

Seul des opérateurs qualifiés sont autorisés à utiliser ce logiciel.

Seul un personnel disposant d'une qualification ou d'une formation appropriée est autorisé à utiliser le logiciel.

Si vous effectuez une formation ou si vous utilisez ce logiciel dans le cadre d'une formation générale, vous ne devez utiliser ce logiciel que sous la supervision permanente d'une personne qualifiée.

Vous devez remplir les conditions suivantes pour utiliser le logiciel :

- Vous avez lu la notice d'instruction.
- Vous êtes familiarisé(e) avec la structure de base et les fonctions du logiciel.
- Vous êtes en mesure de reconnaître des dysfonctionnements du logiciel et de prendre les mesures appropriées en cas de besoin.

5 SYMBOLES ET MISES EN RELIEF UTILISÉS

SYMBOLES

Cette notice d'instruction utilise le symbole suivant :



Le symbole d'information indique des informations supplémentaires, telles que des méthodes alternatives.

MISES EN RELIEF

Les textes et les désignations d'éléments qui sont visualisés par SICAT Suite sont mis en relief en caractères **gras**. Il s'agit des objets suivants de l'interface utilisateur :

- Désignations de zones
- Désignations de boutons
- Désignations d'icônes
- Textes d'indications et de messages apparaissant à l'écran

TÂCHES À RÉALISER

Les tâches à réaliser sont décrites sous forme de listes numérotées :

- ☑ Les conditions préalables sont identifiées par ce symbole.
- 1. Les étapes sont identifiées par des numéros.
 - ▶ Les résultats intermédiaires sont identifiés par ce symbole et mis en retrait.
- 2. Ils sont suivis d'autres étapes.
 - ▶ Les résultats finals sont identifiés par ce symbole.
 - Une instruction qui se compose d'une seule étape est identifiée par ce symbole.

6 VUE D'ENSEMBLE DE LA NOTICE D'INSTRUCTION

SICAT Function fait partie de SICAT Suite comme d'autres applications.

SICAT Suite compose l'environnement dans lequel s'exécutent les applications SICAT. L'installation des applications s'effectue par conséquent avec SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 17 - Standalone].

À ce jour, SICAT Suite est disponible en trois variantes. Quelques-unes des étapes de commande varient selon la variante. C'est pourquoi la notice d'instruction traite les variantes séparément :

- Module SIDEXIS 4
- Plug-in SIDEXIS XG
- Version standalone

Vous n'avez pas besoin d'opter pour une variante ou une autre lors de l'installation de SICAT Suite.

La désinstallation des applications s'effectue également avec SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Désinstaller SICAT Suite* [► Page 235 - Standalone].

7 APERÇU GÉNÉRAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite se compose des éléments suivants :

- SICAT Function - l'utilisation conforme de SICAT Function est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Function.
- SICAT Air - l'utilisation conforme de SICAT Air est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Air.
- SICAT Endo - l'utilisation conforme de SICAT Endo est décrite dans la notice d'instruction de SICAT Endo.

LANGUES

L'interface utilisateur de SICAT Suite prend en charge les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- Français
- Japonais
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Portugais
- Russe

LICENCES

Les étapes suivantes sont nécessaires pour activer une application SICAT ou une fonction individuelle.

- Vous contactez votre partenaire commercial local.
- Vous obtenez un code de bon échange.
- Vous générez une clé de licence à partir du code de bon échange sur SICAT Portal (accessible par la page d'accueil SICAT).
- SICAT ajoute la clé de licence à votre clé d'activation.
- Vous activez avec votre clé d'activation des applications SICAT ou différentes fonctions sur des ordinateurs sur lesquels SICAT Suite est installée.

VERSION COMPLÈTE ET MODE VIEWER

SICAT Suite peut démarrer dans deux modes différents :

- Si vous n'avez pas activé la licence viewer d'au moins une application SICAT, SICAT Suite démarre en mode viewer.
- Si vous n'avez pas activé la licence en version complète d'au moins une application SICAT, SICAT Suite démarre en version complète.

Règles générales :

- Les applications dont la licence en version complète est activée démarrent en version complète.
- Les applications dont la licence viewer est activée démarrent en mode viewer.
- Les applications dont la licence n'est pas activée ne démarrent pas.
- Vous n'avez pas besoin d'opter pour un mode ou un autre lors de l'installation de SICAT Suite.

8 INSTALLER SICAT SUITE



En cas de modification du logiciel, celui-ci risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Ne procédez à aucune modification de l'installation du logiciel.
2. Ne supprimez et ne modifiez aucun composant compris dans le répertoire d'installation du logiciel.



Des supports d'installation endommagés peuvent entraîner l'échec de l'installation.

Manipulez les supports d'installation avec soin et entreposez-les de manière appropriée.



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.



Des autorisations insuffisantes peuvent entraîner l'échec de l'installation ou de la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous de disposer d'autorisations suffisantes sur votre système lorsque vous installez ou mettez à jour le logiciel.



La fonction **Autostart** de Windows est éventuellement désactivée sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir le support optique dans l'explorateur de fichiers de Windows et démarrer manuellement le fichier **SICATSuiteSetup.exe**, le nom du fichier contenant la version de SICAT Suite.

Procédez de la manière suivante pour installer SICAT Suite :

- Votre ordinateur remplit les exigences de configuration système requises. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Configuration système requise* [► Page 8 - Standalone].
1. Insérez le support d'installation de SICAT Suite dans le lecteur optique de votre ordinateur.
 - La fenêtre **Autostart** s'ouvre.
 2. Dans la fenêtre **Autostart**, sélectionnez l'option **Exécuter SICATSuiteSetup.exe**, le nom du fichier contenant la version de SICAT Suite.
 - La configuration logicielle requise est installée, si elle n'est pas déjà disponible sur votre ordinateur.



- Le programme d'installation de SICAT Suite démarre et la fenêtre **INTRODUCTION** s'ouvre :



3. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre **INTRODUCTION**, sélectionnez la langue souhaitée du programme d'installation de SICAT Suite puis cliquez sur **Suivant**.

► La fenêtre **CONTRAT DE LICENCE** s'ouvre :



4. Lisez en entier le contrat de licence de l'utilisateur final, cochez la case d'option **J'accepte les conditions du contrat de licence** puis cliquez sur **Suivant**.

► La fenêtre **OPTIONS** s'ouvre :



5. Pour modifier le dossier du disque dur dans lequel le programme d'installation installe SICAT Suite, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Sélectionner un dossier** s'ouvre.
6. Naviguez jusqu'au dossier souhaité, dans lequel le programme d'installation SICAT Suite doit créer le répertoire « SICAT Suite », puis cliquez sur **OK**.
 - Le programme d'installation de SICAT Suite insère le chemin du dossier sélectionné dans le champ **Où voulez-vous installer le logiciel**.
7. Si SIDEXIS XG ou SIDEXIS 4 est installé sur votre ordinateur, la case à cocher **Je souhaite utiliser SICAT Suite avec SIDEXIS** est disponible. Vous pouvez enregistrer SICAT Suite manuellement, pendant l'installation ou ultérieurement, en tant que plug-in SIDEXIS XG ou module SIDEXIS 4.
 - Lorsque la case **Je souhaite utiliser SICAT Suite avec SIDEXIS** est cochée, la case **Créer un raccourci sur le bureau** n'est pas disponible.
8. Activez ou désactivez la case à cocher **Créer un raccourci sur le bureau**, si elle est disponible.
9. Cliquez sur le bouton **Installer**.

- La fenêtre **PROGRESSION** s'ouvre :



- SICAT Suite et la configuration logicielle restante sont installés.
- Une fois l'installation terminée, la fenêtre **CONFIRMATION** s'ouvre :



10. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

▶ Le programme d'installation de SICAT Suite se ferme.

9 EFFECTUEZ LES ÉTAPES D'ESSAI APRÈS LA MISE À JOUR DU SYSTÈME D'EXPLOITATION



En cas de modification du système d'exploitation, les applications SICAT risquent de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Avant chaque démarrage des applications SICAT, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations ou des mises à jour de sécurité depuis la dernière utilisation des applications SICAT.
2. Si le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations ou des mises à jour de sécurité, effectuez les étapes nécessaires au contrôle des applications SICAT tel que décrit dans les instructions de service.
3. Si le comportement des applications SICAT divergent du comportement décrit dans les instructions de service, n'utilisez plus le logiciel et contactez immédiatement l'assistance SICAT.

Si le système d'exploitation de votre ordinateur a installé des actualisations, vous devez vous assurer que le fonctionnement de SICAT Function est parfait. Effectuez les étapes d'essai suivantes. Si vous constatez des divergences lors d'une étape d'essai, empêchez l'utilisation ultérieure de SICAT Function sur l'ordinateur concerné puis contactez l'assistance SICAT.


PRÉPARATIONS

1. Supprimer le patient « Axx Patient » afin de s'assurer qu'aucune personne non autorisée apporte des modifications.
2. Importez le jeu de données de référence depuis le fichier « SICASuite_ReferenceDataset_1.4.zip »
Le jeu de données se trouve sur le support d'installation de SICAT Suite.
3. Ouvrez le jeu de données de référence « Axx Patient » dans SICAT Function.

SEGMENTATION DE LA MÂCHOIRE INFÉRIEURE

1. Assurez-vous que l'espace de travail **Panorama** est activé.
2. Réinitialisez les vues sur des valeurs standard.
3. Assurez-vous que la vue **3D** montre la radiographie 3D de face.
4. Mettez le mode d'affichage sur **Masquer la région d'arrière-plan**.
5. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « lateral_lt.1 ».


6. Comparez la vue **3D** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation de la segmentation de la mâchoire inférieure et des empreintes optiques.

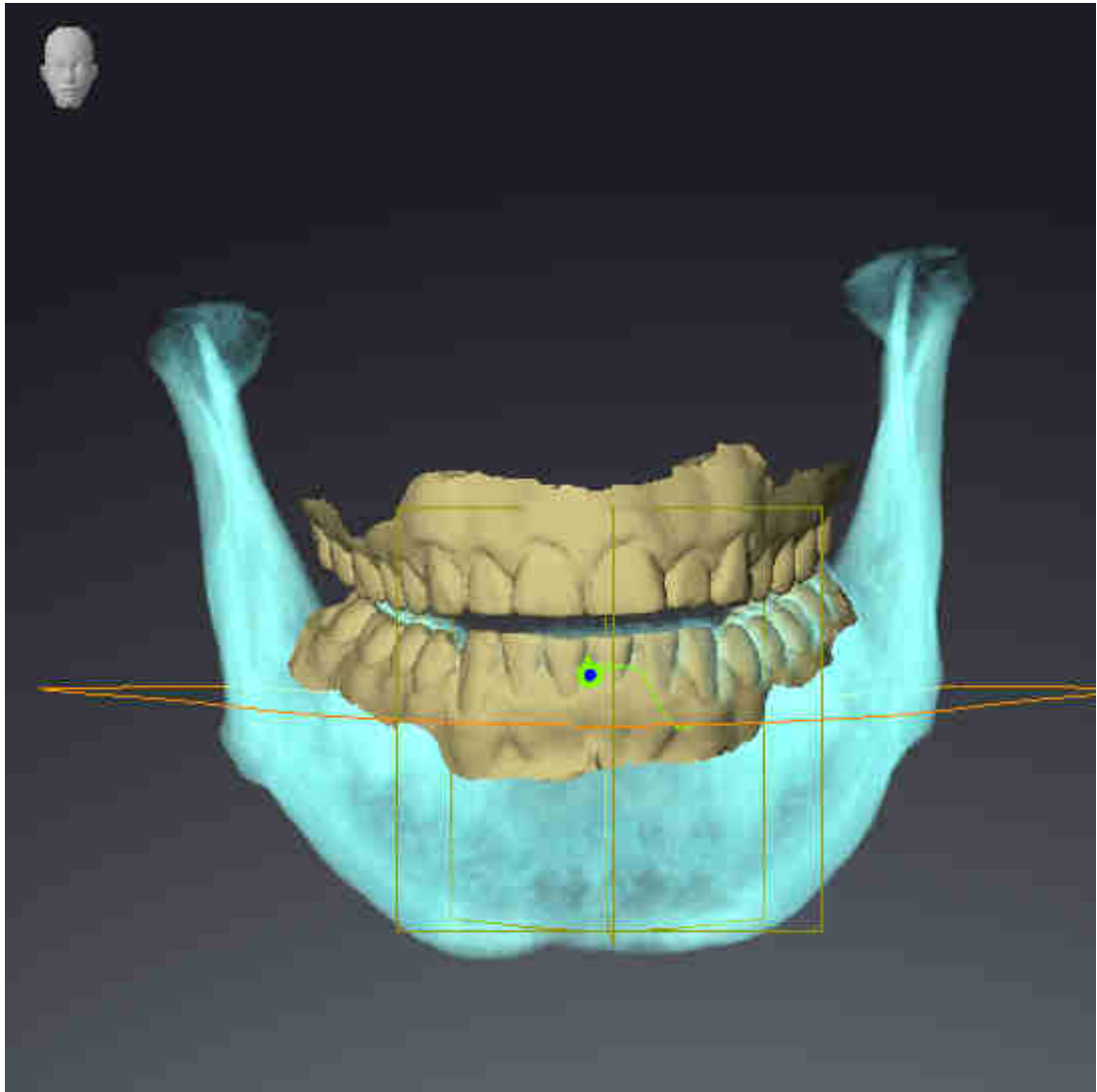


DONNÉES DE MOUVEMENT

1. Assurez-vous que l'espace de travail **TMJ** est activé.
2. Assurez-vous que les valeurs pour **Luminosité** et **Contraste** correspondent respectivement à la valeur standard de 50 %.
3. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « lateral_lt.1 ».
4. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Régions du volume** > **Mandibule** l'élément **Côté droit de la mandibule** et focalisez-le.
5. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Régions du volume** > **Mandibule** l'élément **Côté gauche de la mandibule** et focalisez-le.
6. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'élément **Régions du volume**.
7. Activez dans l'espace **Propriétés** l'option **Afficher la limite de la segmentation**.

8. Comparez la vue **Condyle droit Sagittal** avec la capture d'écran suivante.

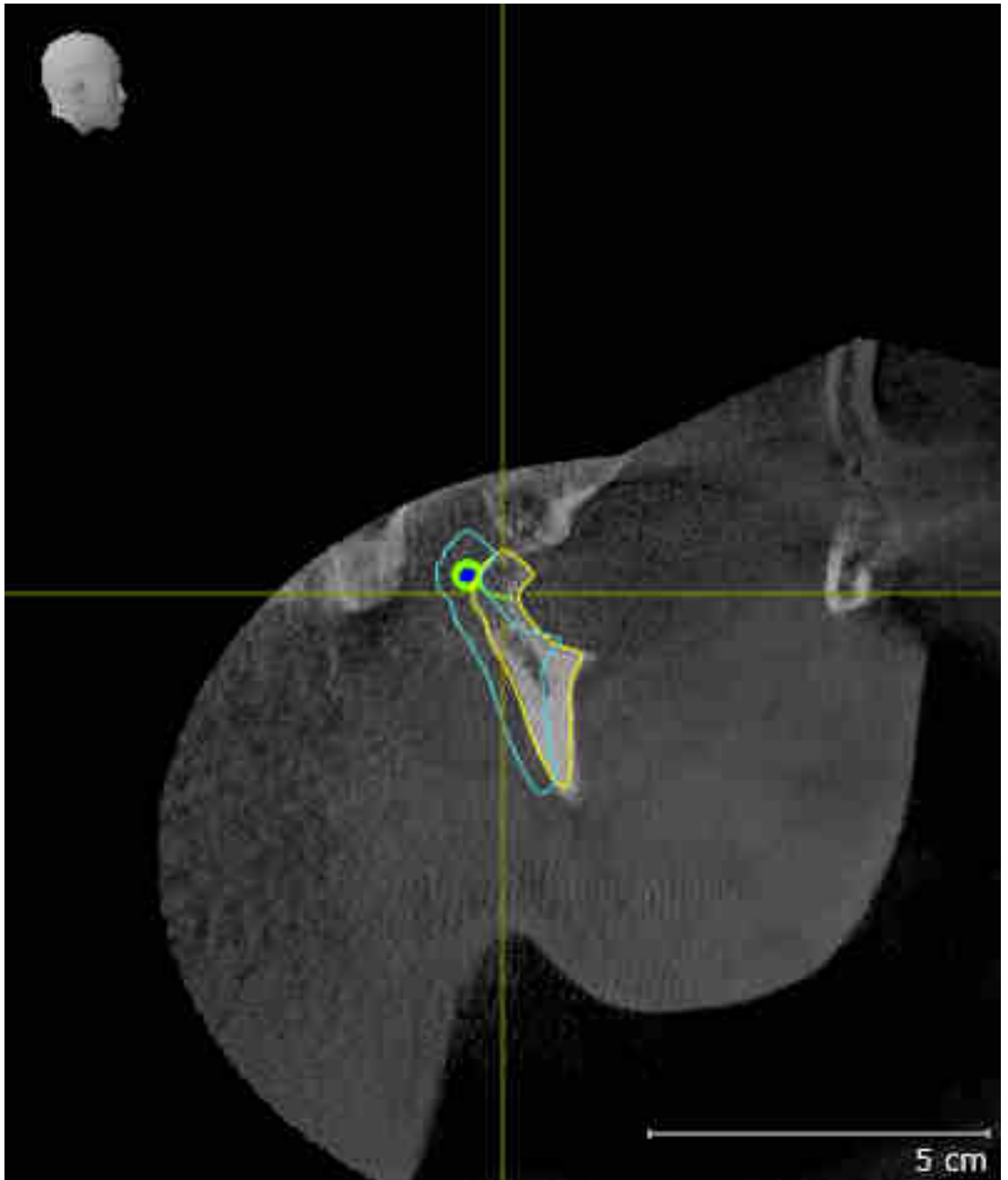


9. Comparez la vue **Condyle gauche Coronal** avec la capture d'écran suivante.

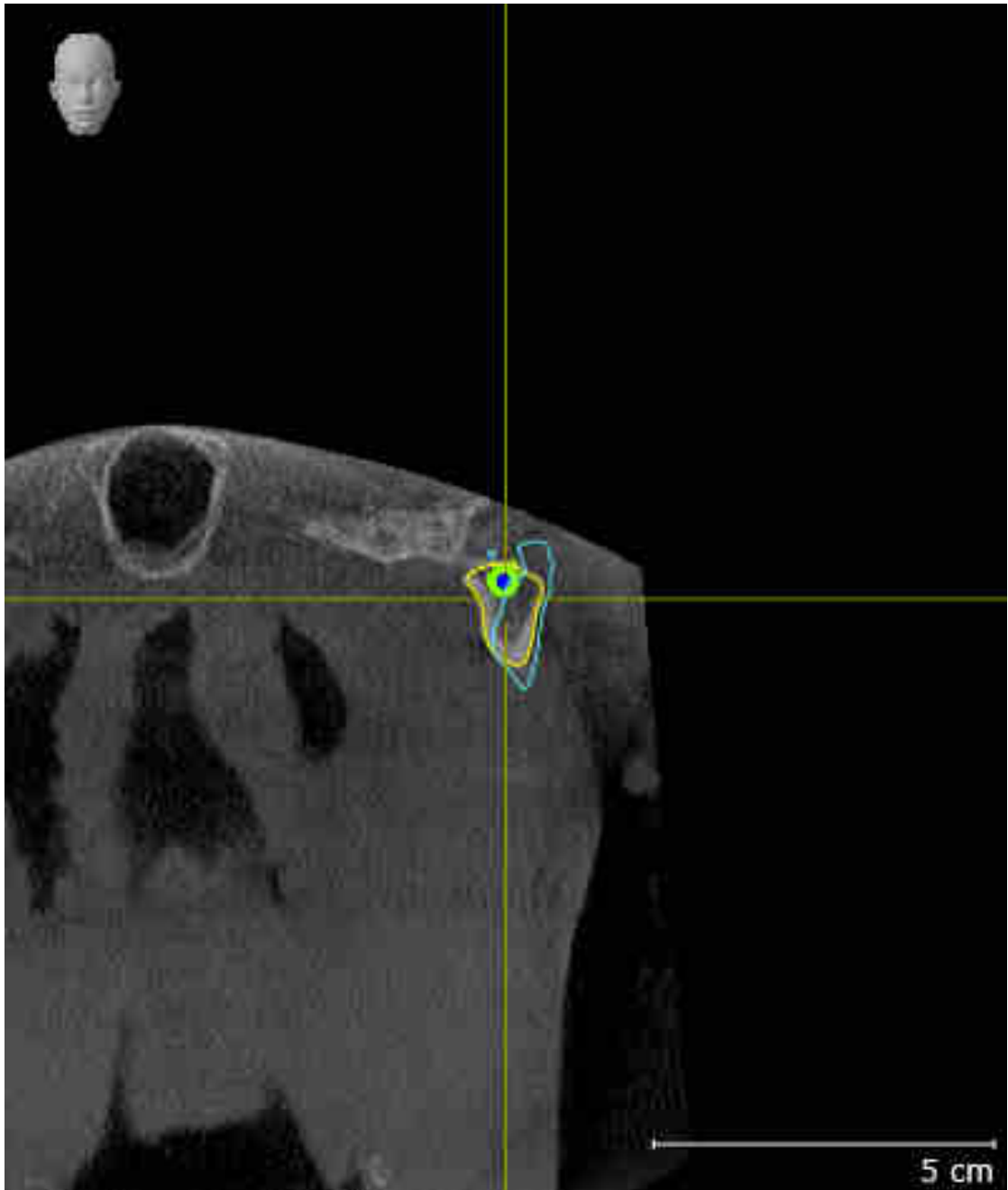

TRIANGLE DE BONWILL

1. Assurez-vous que l'espace de travail **TMJ** est activé.
2. Assurez-vous que la vue **3D** montre la radiographie 3D de face.
3. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'élément **Données de mouvement**.
4. Activez dans l'espace **Propriétés** l'option **Triangle de Bonwill**. Assurez-vous que la valeur pour **Incrément** est bien « 5 ».
5. Sélectionnez dans la liste **Relation intermaxillaire active** l'élément « chewing.1 ».


6. Mettez le mode d'affichage de la vue **3D** sur **Masquer la région d'arrière-plan**.
7. Masquez les empreintes optiques.
8. Comparez la vue **3D** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation du triangle Bonwill et des points de suivi disponibles.

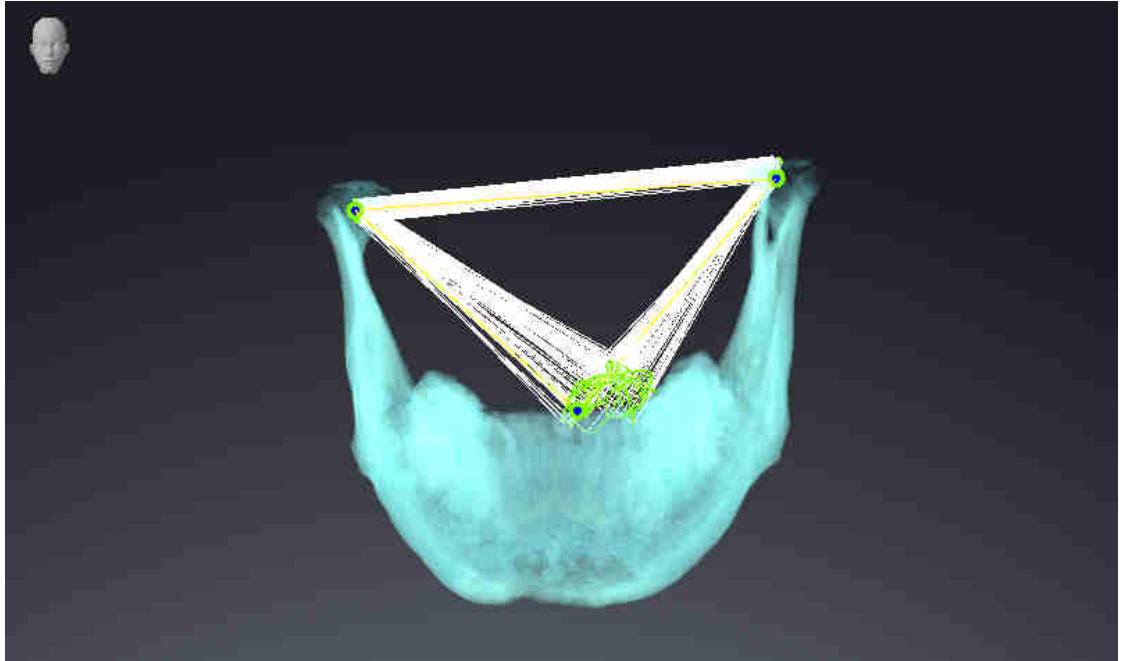

MESURES


1. Assurez-vous que l'espace de travail **MPR/Radiologie** est activé.
2. Assurez-vous que dans la vue **Axial** les valeurs pour **Luminosité** et **Contraste** correspondent respectivement à la valeur standard de 50 %.
3. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** sous **Mesures** > l'élément « 20,99 mm » et focalisez-le.

4. Comparez la vue **Axial** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation des objets de mesure (20,99 mm, 20,05 mm, 74,57 mm et 29,43°).

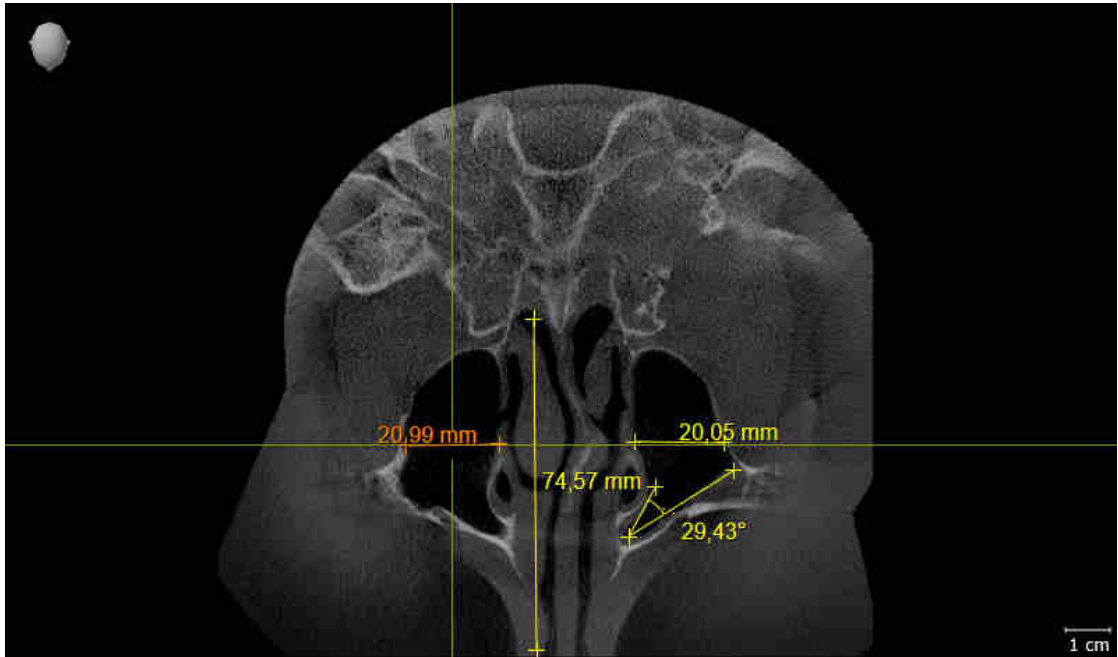

VUE PANORAMIQUE

1. Assurez-vous que l'espace de travail **Panorama** est activé.
2. Réinitialisez les vues sur des valeurs standard.
3. Comparez la vue **Panorama** avec la capture d'écran suivante. Vérifiez notamment la représentation de la vue **Panorama** et de la fenêtre d'examen.

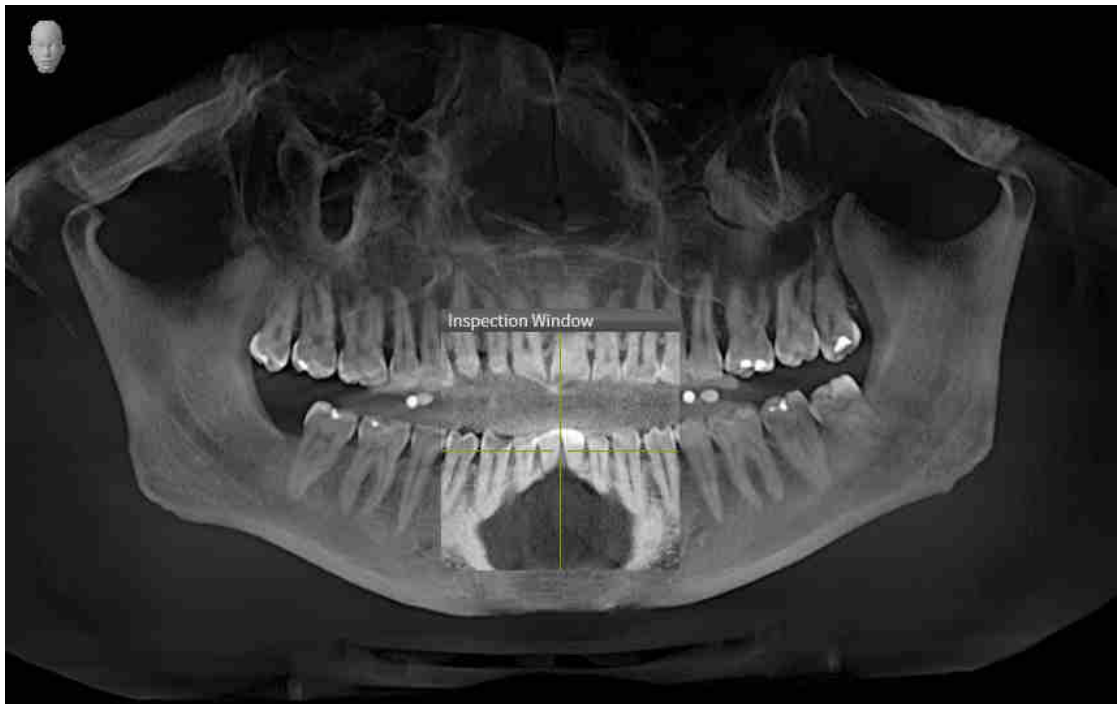

10 ACTUALISER OU RÉPARER SICAT SUITE

ACTUALISER SICAT SUITE

Vous pouvez actualiser SICAT Suite en démarrant le programme d'installation de SICAT Suite et en cliquant sur le bouton **Actualiser**. Le programme d'installation désinstalle d'abord l'ancienne version de SICAT Suite. Toutes les données et tous les réglages sont conservés.



Une nouvelle version de la version standalone de SICAT Suite a besoin de dépôts de dossiers patient actualisés. Au premier démarrage de la nouvelle version ou lorsque vous activez un dépôt de dossiers patient obsolète, SICAT Suite demande si vous voulez actualiser le dépôt de dossiers patient. Si vous confirmez le message, SICAT Suite actualise automatiquement le dépôt de dossiers patient. **ATTENTION ! Vous ne pouvez plus utiliser les dépôts de dossiers patient actualisés avec des versions antérieures de SICAT Suite.**



Lorsque vous mettez à niveau SIDEXIS XG vers SIDEXIS 4.1.3 ou vers une version supérieure puis actualisez SICAT Suite, le SICAT Suite-Installer enregistre SICAT Suite en tant que module SIDEXIS 4. Lorsque vous ouvrez une radiographie 3D, SICAT Suite vérifie si des études existent dans SIDEXIS XG pour cette radiographie 3D, et les reprend de SIDEXIS XG vers SIDEXIS 4.

RÉPARER SICAT SUITE

Vous pouvez réparer SICAT Suite en démarrant le programme d'installation de SICAT Suite et en cliquant sur le bouton **Réparer**. Toutes les données et tous les réglages sont conservés.

L'actualisation et la réparation de SICAT Suite utilisent toutes deux le programme d'installation de SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [► Page 17 - Standalone].

11 PARTICULARITÉS DANS CETTE VERSION

Il existe des différences dans des espaces déterminés selon si vous utilisez SICAT Function individuellement ou raccordé à d'autres logiciels.

DONNÉES PATIENT ET DONNÉES DE VOLUME

La version standalone de SICAT Suite contient sa propre gestion centrale des dossiers patient et des données de volume. Le concept de dossiers patient dans la version standalone de SICAT Suite est comparable à celui des dossiers patient conventionnels :

- Les dossiers patient sont enregistrés dans des dépôts de dossiers comparables à des classeurs de rangement.
- L'activation d'un dossier patient est comparable au retrait d'un dossier d'un classeur de rangement pour le poser sur votre bureau.
- L'ouverture des données patient d'un dossier dans des applications SICAT équivaut à prélever des pages d'un dossier patient.
- L'ajout de radiographies 3D à un dossier patient équivaut à ajouter des radiographies 2D à un dossier patient conventionnel.
- Une radiographie 3D peut être la base de plusieurs projets de planification. Les projets de planification sont également des éléments d'un dossier patient.
- Une radiographie 3D et les projets de planification qui lui sont associés forment ensemble une étude.

Vous trouverez des informations sur la gestion des dépôts de dossiers patient sous *Dépôts de dossiers patient* [► Page 53 - Standalone]. Vous trouverez des informations sur la gestion des dossiers patient sous *Dossiers patient* [► Page 71 - Standalone].



Il est recommandé de sauvegarder aussi les réglages utilisateur des applications SICAT en plus des données patient. Les réglages utilisateur sont consignés, pour chaque utilisateur séparément, dans deux répertoires. Vous pouvez ouvrir ces répertoires en entrant `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` et `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` dans la barre d'adresses de l'explorateur Windows.

RÉGLAGES

Dans la version standalone, SICAT Suite gère lui-même les réglages généraux. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [► Page 217 - Standalone].

LICENCES

La version standalone et la version liée à d'autres logiciel de SICAT Suite utilisent les mêmes licences. Vous n'avez pas besoin d'opter pour une version ou une autre lors de l'installation de SICAT Suite.

OUVRIRE DES ÉTUDES AVEC OU SANS DROITS D'ACCÈS EN ÉCRITURE

Pour vous permettre d'effectuer et d'enregistrer des modifications des études SICAT Function, il faut que les conditions suivantes soient satisfaites :

- Une licence en version complète SICAT Function doit être activée.
- Un dépôt de dossiers patient doit être actif.

Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas effectuer et enregistrer des modifications des études SICAT Function. Quand vous avez activé une licence viewer SICAT Function, vous pouvez visionner des radiographies 3D et les études SICAT Function.

Le tableau suivant indique les fonctions qui sont disponibles lorsqu'une licence d'une application SICAT et un dépôt de dossiers patient sont activés :

FONCTION	LICENCE D'APPLICATION EN VERSION COMPLÈTE ET DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIVÉS	LICENCE VIEWER D'APPLICATION ET DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIVÉS	PAS DE LICENCE D'APPLICATION ET DE DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIVÉ
Zone assistance	Oui	Oui	Oui
Réglages généraux	Oui	Oui	Oui
SICAT Function Réglages	Oui	Oui	Non
Exportation de données	Oui	Non	Non
Gestion des dépôts de dossiers patient	Oui	Non	Non
Gestion des dossiers patient	Oui	Non	Non
Importation de données	Oui	Non	Non
Aide	Oui	Oui	Oui

Le tableau suivant indique les fonctions qui sont disponibles lorsqu'une licence SICAT Function et un dépôt de dossiers patient sont activés :

FONCTION	SICAT FUNCTION LICENCE EN VERSION COMPLÈTE ET DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIVÉS	SICAT FUNCTION LICENCE VIEWER ET DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIVÉS	PAS DE LICENCE SICAT FUNCTION ET DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIVÉS
Effectuer des modifications des études SICAT Function	Oui	Non	Non
Ouvrir les données en mode viewer	Non	Oui	Non

Dans certaines conditions, il arrive que vous ne puissiez pas effectuer ni enregistrer des modifications des études SICAT Function, même si une licence d'application est activée. Un processus de commande en cours peut en être la cause.

Dans la version standalone, le statut de la licence conditionne également les fonctions disponibles dans la fenêtre **SICAT Suite Home**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de la fenêtre "SICAT Suite Home"* [► Page 40 - Standalone].

Autres informations disponibles sous *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [► Page 230 - Standalone].

12 FLUX DE TRAVAIL STANDARD DE SICAT FONCTION



Des failles de sécurité dans votre système informatique peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

1. Assurez-vous que votre établissement a adopté des directives permettant de détecter et d'éviter toute menace à la sécurité de votre environnement informatique.
2. Installez un antivirus à jour et exécutez-le.
3. Assurez-vous que les fichiers de définition de l'antivirus soient régulièrement mis à jour.



Un accès non autorisé à votre station de travail peut entraîner un risque pour la confidentialité et l'intégrité de vos données patient.

Limitez l'accès à votre station de travail aux personnes autorisées.



Des problèmes de cybersécurité peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

Si vous supposez l'existence de problèmes de cybersécurité de votre application SICAT, prenez immédiatement contact avec l'assistance.



Avant de commencer le travail avec SICAT Suite, il est important de lire intégralement la présente notice d'instruction, et en particulier toutes les consignes de sécurité. Gardez cette notice d'instruction à portée de main pour y rechercher des informations.

JEUX DE DONNÉES

SICAT Function combine trois jeux de données différents :

- Les données de radiographie 3D, par exemple d'un Sirona GALILEOS
- Les données de mouvement de la mâchoire, par exemple d'un SICAT JMT+
- Des empreintes optiques numériques, par exemple d'un Sirona CEREC

INSTALLATION

L'installation de SICAT Suite est décrite sous *Installer SICAT Suite* [► Page 17 - Standalone].

VALIDER LA VERSION COMPLÈTE

1. Si vous avez acheté une licence pour SICAT Function, activez la licence afin de valider la version complète. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 44 - Standalone].
2. Pour pouvoir enregistrer vos données, créez au moins un dépôt de dossiers patient et activez-le. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Dépôts de dossiers patient* [► Page 53 - Standalone].



Si vous n'avez pas acheté de licence pour SICAT Fonction, ouvrez une radiographie 3D en mode viewer. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [► Page 230 - Standalone].



Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite appartient à un réseau et que la configuration du réseau le permet, vous pouvez enregistrer les dépôts de dossiers patient et les dossiers patient qu'ils contiennent dans un système de fichiers réseau. En général, le système de fichiers réseau doit prendre en charge à cet effet le protocole NFS ou SMB. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Dépôts de dossiers patient* [► Page 53 - Standalone].

DÉMARRER

Le démarrage de SICAT Suite est décrit sous *Démarrer SICAT Suite* [► Page 37 - Standalone].

RÉGLAGES

Effectuez les réglages souhaités dans la zone **Réglages**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [► Page 217 - Standalone].

ACQUISITION DES DONNÉES

1. Pendant que le SICAT Fusion Bite est dans la bouche du patient, prenez un cliché 3D du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les guides rapides SICAT JMT*.
2. Réalisez l'acquisition des données de mouvement de la mâchoire du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les notices d'instruction SICAT JMT*.
3. Réalisez les empreintes optiques du maxillaire et de la mandibule. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la notice d'instruction de l'appareil correspondant.

OUVRIRE UN JEU DE DONNÉES

1. Importez la radiographie 3D dans le dépôt de dossiers patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importation de données* [► Page 61 - Standalone].
2. Pour rechercher des dossiers patient et gérer les données importées, suivez les instructions sous *Dossiers patient* [► Page 71 - Standalone].
3. Pour travailler avec les données de dossiers patient, ouvrez un dossier patient dans SICAT Fonction. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir des radiographies 3D ou des projets de planification à partir de la vue d'ensemble des dossiers patient* [► Page 79 - Standalone].

ÉTAPES DE TRAVAIL DANS SICAT FUNCTION



ÉDITER UN JEU DE DONNÉES DANS SICAT FUNCTION

1. Si nécessaire, adaptez l'orientation du volume et la zone panoramique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 135 - Standalone].
2. Importez et recalez les données de mouvement de la mâchoire dans SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 147 - Standalone].
3. Segmentez la mandibule et, le cas échéant, les fosses. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Segmenter la mandibule* [► Page 153 - Standalone] et *Segmenter les fosses* [► Page 155 - Standalone].
 - SICAT Function visualise les données de mouvement de la mâchoire importées dans la vue **3D**.
4. Importez les empreintes optiques et recalez-les sur les données de radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone].

5. Évaluez les mouvements de la mâchoire dans l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 101 - Standalone] et *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 175 - Standalone]. Utilisez les tracés anatomiques pour vous aider, en particulier lorsque vous n'avez pas effectué de segmentation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [▶ Page 172 - Standalone], *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [▶ Page 173 - Standalone], *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [▶ Page 174 - Standalone] et *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 169 - Standalone].
6. Définissez une position thérapeutique pour la gouttière thérapeutique OPTIMOTION. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [▶ Page 201 - Standalone].
7. Commandez une gouttière thérapeutique OPTIMOTION. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [▶ Page 200 - Standalone].
8. Exportez des données, p. ex. pour obtenir un deuxième avis. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [▶ Page 196 - Standalone].

TERMINER OU INTERROMPRE LE TRAVAIL SUR LES JEUX DE DONNÉES

- Pour terminer ou interrompre votre travail, enregistrez-le en fermant le dossier patient actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fermer SICAT Suite* [▶ Page 233 - Standalone].

NOTICE D'INSTRUCTION ET ASSISTANCE

La notice d'instruction est disponible dans la fenêtre **Aide de SICAT Suite**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir les instructions de service* [▶ Page 43 - Standalone].

Une assistance supplémentaire est disponible dans la zone **Assistance**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Assistance* [▶ Page 226 - Standalone].

13 DÉMARRER SICAT SUITE

Pour démarrer SICAT Function vous devez tout d'abord démarrer SICAT Suite.


Procédez de la manière suivante pour démarrer SICAT Suite :

- ☑ SICAT Suite a été installé avec succès. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Installer SICAT Suite* [▶ *Page 17 - Standalone*].




- Si un raccourci a été créé sur le bureau lors de l'installation, cliquez sur l'icône **SICAT Suite** sur le bureau Windows.
- ▶ SICAT Suite démarre et la fenêtre **SICAT Suite Home** s'ouvre. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de la fenêtre "SICAT Suite Home"* [▶ *Page 40 - Standalone*].

Vous pouvez également démarrer SICAT Suite en appuyant sur la touche **Windows**, en saisissant **SICAT Suite** puis en cliquant sur l'icône **SICAT Suite**.

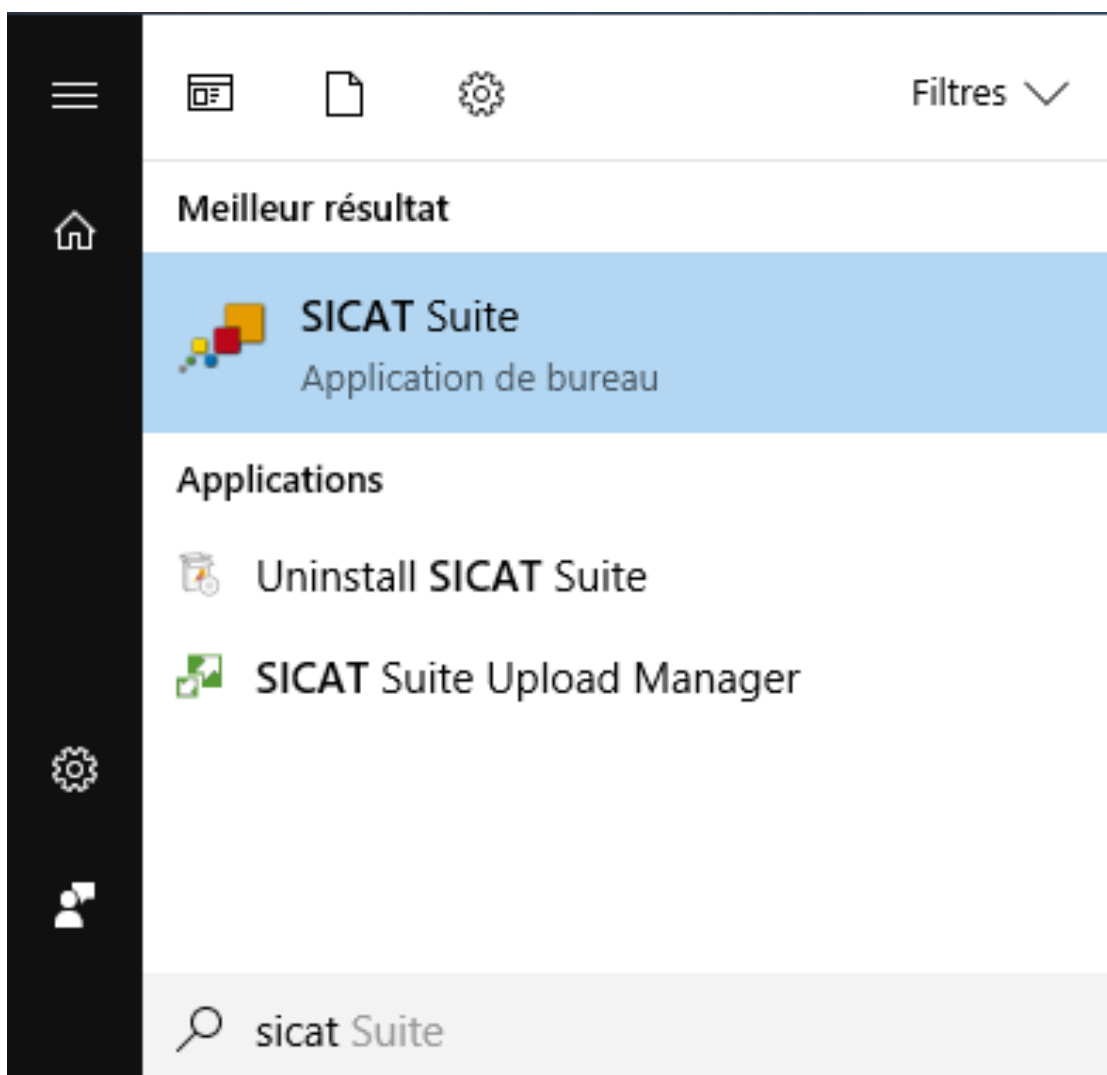

14 INTERFACE UTILISATEUR DE SICAT SUITE

L'interface utilisateur de SICAT Suite se compose des éléments suivants :

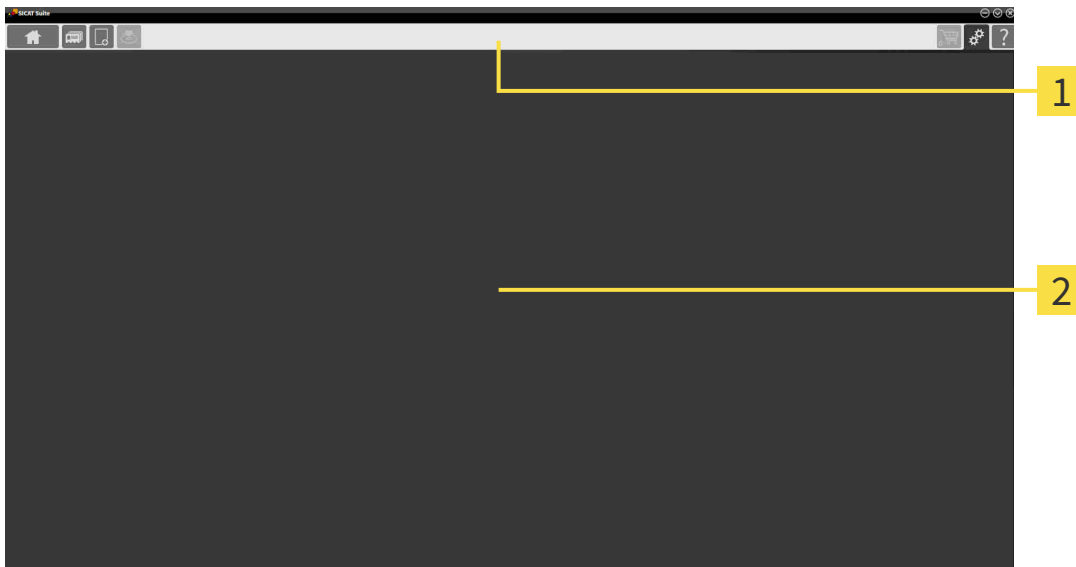

1 Barre de navigation

2 Zone d'application

- La barre de navigation, dans la partie supérieure de SICAT Suite, affiche des onglets permettant de commuter entre différentes fenêtres et applications.
- La **Zone d'application**, qui occupe le reste de l'espace de SICAT Suite, affiche l'interface utilisateur de l'application SICAT active.

La **Barre de navigation** comprend trois zones. La zone latérale gauche et la zone latérale droite sont toujours visibles. SICAT Suite n'affiche la zone médiane que lorsqu'un dossier patient est activé.

La zone latérale gauche contient les onglets suivants :



- **SICAT Suite Home** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de la fenêtre "SICAT Suite Home"* [► Page 40 - Standalone].



- **Dossiers patient** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Dossiers patient* [► Page 71 - Standalone].



- **Ajouter les nouvelles données** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importation de données* [► Page 61 - Standalone].



- **Transmettre les données** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [► Page 196 - Standalone].

La zone médiane contient les onglets suivants :



- **Dossier patient actif** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Travailler avec des dossiers patient actifs* [▶ Page 76 - Standalone].
- **Applications** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter entre les applications SICAT* [▶ Page 42 - Standalone].



La zone latérale droite contient les onglets suivants :



- **Panier d'achat** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [▶ Page 200 - Standalone].




- **Réglages** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Réglages* [▶ Page 217 - Standalone].



- **Assistance** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Assistance* [▶ Page 226 - Standalone].

14.1 VUE D'ENSEMBLE DE LA FENÊTRE "SICAT SUITE HOME"

La fenêtre **SICAT Suite Home** vous accueille au démarrage de la version standalone de SICAT Suite :

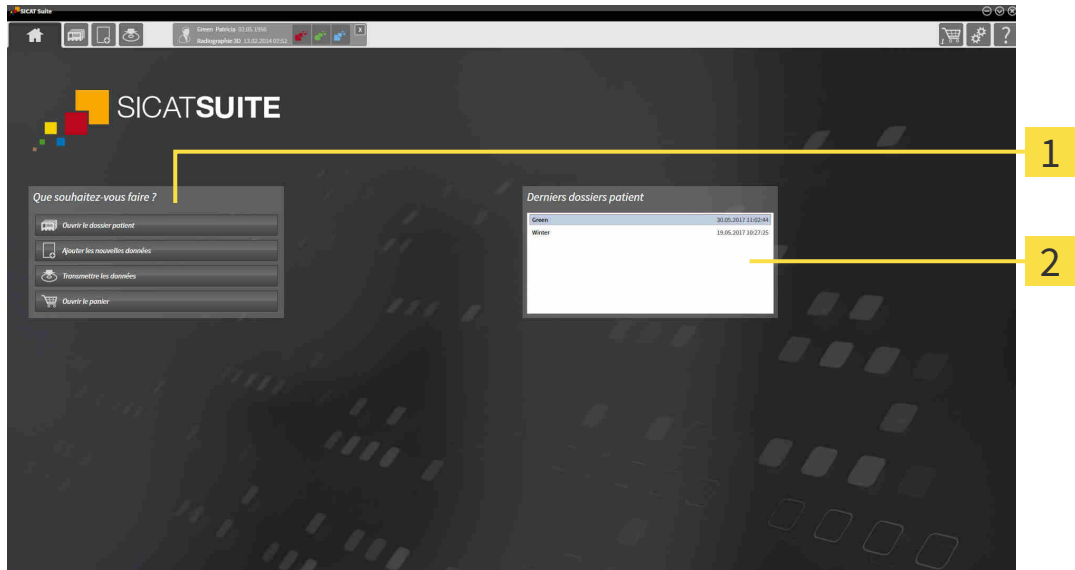

1 Zone **Que souhaitez-vous faire**

2 Zone **Derniers dossiers patient**



Vous pouvez retourner à tout moment à cette fenêtre en cliquant sur l'icône **SICAT Suite Home**. Le contenu de la fenêtre **SICAT Suite Home** dépend des paramètres suivants :

- État d'activation et type des licences
- État du dépôt de dossiers patient

Si aucune licence n'est activée, la fenêtre **SICAT Suite Home** indique seulement un texte d'avertissement et le bouton **Activer la licence**.

Si une licence viewer d'au moins une application SICAT est activée mais qu'aucune licence en version complète d'une application SICAT n'est activée, SICAT Suite fonctionne en mode viewer. Dans ce mode, vous ne pouvez pas établir de connexion aux dépôts de dossiers patient, ni créer de dépôts de dossiers patient, et les fonctions d'importation, d'édition et d'enregistrement des données patient ne sont pas disponibles. C'est pourquoi seuls les boutons **Visualiser les nouvelles données** et **Activer la licence** sont disponibles dans la fenêtre **SICAT Suite Home**.

Lorsqu'une licence en version complète est activée, mais qu'aucun dépôt de dossiers patient n'est créé dans SICAT Suite, vous pouvez créer des dépôts de dossiers patient, cependant les fonctions d'importation, d'édition et d'enregistrement des données patient ne sont pas disponibles. C'est pourquoi seuls les boutons **Visualiser les nouvelles données** et **Créer un dépôt de dossiers patient** sont disponibles dans la fenêtre **SICAT Suite Home**.

Lorsqu'une licence en version complète est activée et qu'un dépôt de dossiers patient est créé et activé dans SICAT Suite, les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre **SICAT Suite Home**, dans la zone **Que souhaitez-vous faire** :



- **Ouvrir** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Dossiers patient* [▶ Page 71 - Standalone].



- **Ajouter les nouvelles données** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importation de données* [▶ Page 61 - Standalone].



- **Transmettre les données** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [▶ Page 196 - Standalone].



- **Panier d'achat** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Processus de commande* [▶ Page 200 - Standalone].

- En outre, la zone **Derniers dossiers patient** affiche une liste des derniers dossiers patient ouverts. Vous pouvez ouvrir ces dossiers patient à l'aide d'un double-clic.



Lorsque le réglage **Afficher les informations patient sous forme anonyme** est actif, la fenêtre **SICAT Suite Home** masque la zone **Derniers dossiers patient**.

15 COMMUTER ENTRE LES APPLICATIONS SICAT

Procédez de la manière suivante pour commuter entre les applications SICAT :



- Dans la **Barre de navigation**, cliquez sur le bouton qui porte la désignation de l'application SICAT souhaitée.

- ▶ SICAT Suite passe à l'application sélectionnée.


16 OUVRIR LES INSTRUCTIONS DE SERVICE

Les notices d'instruction des applications SICAT sont disponibles par la fenêtre **Assistance** sous forme de fichiers PDF.



Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Assistance** en cliquant sur l'icône **Assistance** dans la **Barre de navigation** ou en appuyant sur la touche F1.

La fenêtre **Assistance** présente l'aspect suivant :

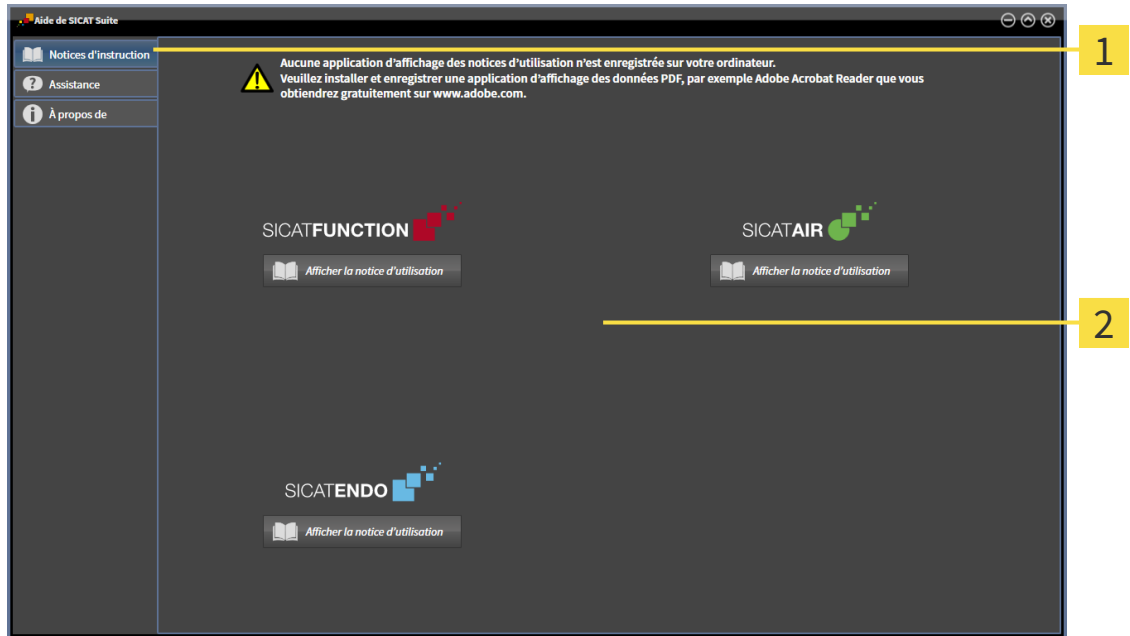

1 Onglet **Notice d'instruction**

2 Fenêtre **Notice d'instruction**

Vous pouvez ouvrir l'aide souhaitée en cliquant sur le bouton **Afficher la notice d'utilisation**.

17 LICENCES

SICAT Suite indique uniquement les applications SICAT pour lesquelles vous avez activé une licence.



Si les fonctions **Ajouter les nouvelles données** ou **Visualiser les nouvelles données** sont disponibles dans SICAT Suite en raison de licences activées, vous pouvez visionner des jeux de données exportés précédemment aussi sans licence SICAT Function activée.

Les types de licences suivants existent :

- Une licence viewer avec laquelle vous pouvez utiliser une application sans limite de temps en mode viewer.
- Une licence de démonstration vous permettant d'obtenir un accès limité dans le temps aux versions complètes d'une ou de plusieurs applications SICAT.
- Une licence en version complète vous permettant d'obtenir un accès illimité dans le temps aux versions complètes d'une ou de plusieurs applications SICAT.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour activer une application SICAT ou une fonction individuelle.

- Vous contactez votre partenaire commercial local.
- Vous obtenez un code de bon échange.
- Vous générez une clé de licence à partir du code de bon échange sur SICAT Portal (accessible par la page d'accueil SICAT).
- SICAT ajoute la clé de licence à votre clé d'activation.
- Vous activez avec votre clé d'activation des applications SICAT ou différentes fonctions sur des ordinateurs sur lesquels SICAT Suite est installée.

Ci-après concerne l'activation et la désactivation de licences :

- Vous recevez uniquement des clés licence d'applications SICAT qui sont autorisées dans votre pays.
- Lorsque vous activez une clé d'activation sur un ordinateur, une licence d'applications SICAT comprises ou de fonctions comprises est respectivement liée à l'ordinateur. Les licences ne sont plus disponibles pour une activation sur un autre ordinateur.
- Vous pouvez désactiver des licences individuellement, pour chaque application SICAT, ou différentes fonctions. Les licences restituées sont disponibles pour une nouvelle activation sur le même ordinateur ou sur un autre.
- Si vous restituez la licence en version complète d'une application SICAT, vous recevez automatiquement une licence viewer dans la mesure où l'application est autorisée dans votre pays.
- Lorsque vous activez une licence en version complète, vous recevez automatiquement des licences complètes pour toutes les applications qui sont autorisées dans votre pays.

La conversion d'un code de bon échange dans une clé d'activation est décrite sous *Utiliser des codes de bon d'échange* [► Page 52 - Standalone].

La fenêtre **Aperçu de vos licences** fournit une vue d'ensemble des licences qui sont activées sur votre ordinateur. SICAT Suite indique la date d'expiration des licences de démonstration. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences"* [► Page 46 - Standalone].

Vous pouvez activer les licences de deux manières différentes :

- Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite dispose d'une connexion Internet active, il est possible de procéder à une activation automatique de la licence. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences via une connexion Internet active* [► Page 47 - Standalone].
- Si vous le souhaitez, ou si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite ne dispose pas de connexion Internet active, vous pouvez procéder manuellement à l'activation de la licence en utilisant des fichiers de demande de licence. Vous devez télécharger ces fichiers de demande de licence sur la page Internet de SICAT. En contrepartie, vous recevez un fichier d'activation de licence que vous devez activer dans SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [► Page 49 - Standalone].

Vous pouvez désactiver individuellement des licences pour chaque application ou fonction. Après avoir désactivé une licence, vous pouvez entrer le même code d'activation ou un autre. Les licences restituées sont disponibles pour une activation sur le même ordinateur ou sur un autre. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 51 - Standalone].

17.1 OUVRIRE LA FENÊTRE "APERÇU DE VOS LICENCES"




1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur le symbole **Réglages**.

► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Licences**.

► La fenêtre **Aperçu de vos licences** s'ouvre :

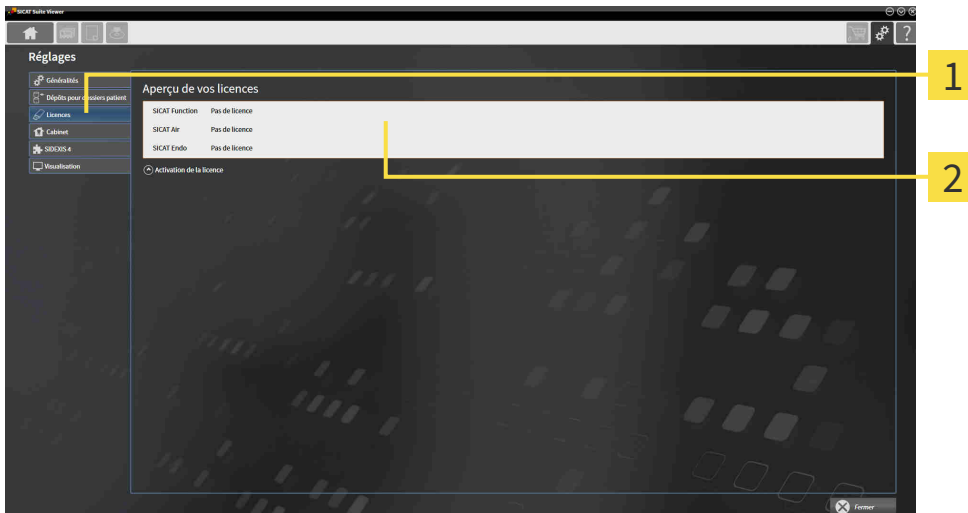

1 Onglet **Licences**

2 Fenêtre **Aperçu de vos licences**

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Activer des licences via une connexion Internet active* [► Page 47 - Standalone]
- *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [► Page 49 - Standalone]
- *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 51 - Standalone]

17.2 ACTIVER DES LICENCES VIA UNE CONNEXION INTERNET ACTIVE

REMARQUE **Le dossier patient doit être fermé**
Vous devez fermer le dossier patient actif avant de procéder à des modifications des licences.


REMARQUE **Le panier doit être vide.**
Le panier doit être vide avant de pouvoir apporter des modifications sur les licences.

Procédez de la manière suivante pour démarrer la procédure d'activation :

- ☑ Il manque une licence activée à au moins une application SICAT ou une fonction individuelle.
- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences" [► Page 46 - Standalone]*.

1. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur le bouton **Activation de la licence**.

► La zone **Aperçu de vos licences** est développée :

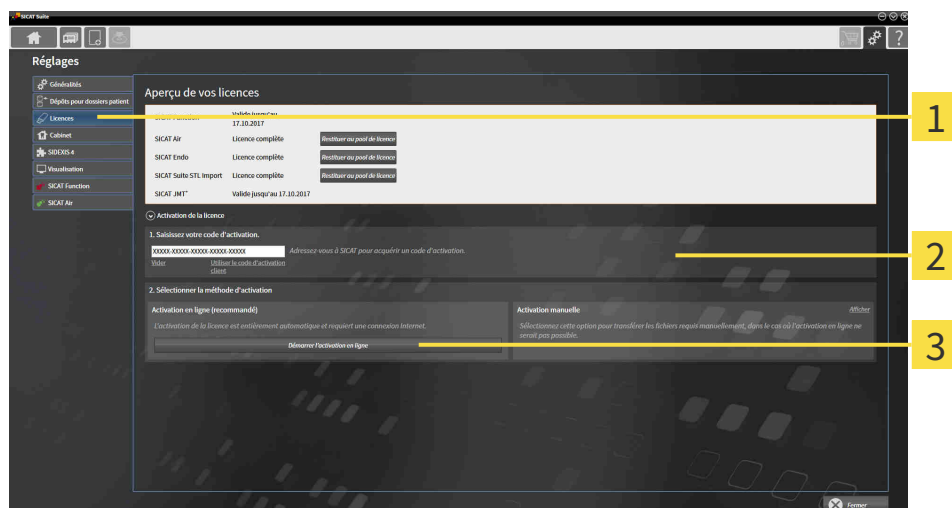

- 1** Bouton **Activation de la licence**
- 2** Zone **Saisissez votre code d'activation**
- 3** Bouton **Démarrer l'activation en ligne**

2. Saisissez votre clé d'activation dans le champ **Saisissez votre code d'activation**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'activation en ligne**.

4. Au cas où une fenêtre **Pare-feu Windows** s'ouvre, autorisez SICAT Suite à accéder à Internet.
 - ▶ Les licences acquises pour des applications ou des fonctions individuelles installées sont extraites de votre pool de licence et activées dans SICAT Suite sur votre ordinateur actuel.
 - ▶ La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été activée avec succès.**



Pour réactiver une application SICAT, vous pouvez utiliser votre clé d'activation client en cliquant sur le bouton **Utiliser le code d'activation client** dans la zone **Saisissez votre code d'activation**. Pour vider le champ contenant la clé de licence actuelle, vous pouvez cliquer sur le bouton **Vider**.

17.3 ACTIVER DES LICENCES MANUELLEMENT OU SANS CONNEXION INTERNET ACTIVE

REMARQUE **Le dossier patient doit être fermé**
Vous devez fermer le dossier patient actif avant de procéder à des modifications des licences.

REMARQUE **Le panier doit être vide.**
Le panier doit être vide avant de pouvoir apporter des modifications sur les licences.

Pour activer les licences manuellement ou sans connexion Internet active, procédez de la manière suivante :


- ☑ Il manque une licence activée à au moins une application SICAT ou une fonction individuelle.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences" [► Page 46 - Standalone]*.

1. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur **Activation de la licence**.

► La zone **Activation de la licence** est développée.

2. Cliquez sur **Afficher** dans la zone **Activation manuelle**.

► La zone **Activation manuelle** est développée :

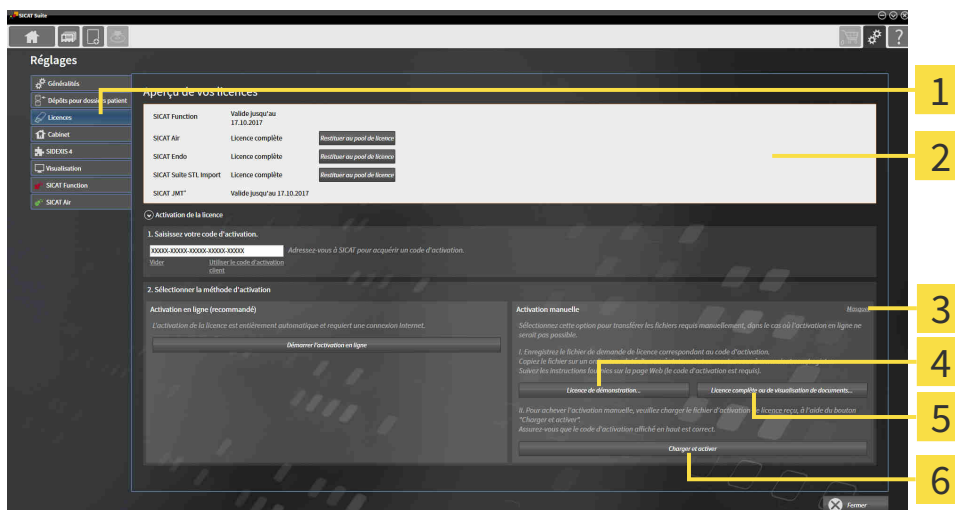

1 Activation de la licence

4 Bouton **Licence de démonstration**

2 Zone **Saisissez votre code d'activation**

5 Bouton **Licence complète ou de visualisation de documents**

3 **Afficher**

6 Bouton **Charger et activer**

3. Pour activer une licence complète, cliquez sur le bouton **Licence complète ou de visualisation de documents**.

4. Pour activer une licence de démonstration, cliquez sur le bouton **Licence de démonstration**.

► Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.

5. Naviguez jusqu'au dossier souhaité pour le fichier de demande de licence, puis cliquez sur **OK**.
 - ▶ Un fichier de demande de licence avec l'extension **WibuCmRaC** est généré et enregistré dans le dossier sélectionné.
6. Copiez le fichier de demande de licence sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active, par exemple par l'intermédiaire d'une clé USB.
7. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.com/register>.
8. Suivez les instructions fournies sur la page Internet d'activation.
 - ▶ Les licences acquises pour les applications ou les fonctions installées sont extraites de votre pool de licences.
 - ▶ Le serveur de licences SICAT génère un fichier d'activation de licence avec l'extension **WibuCm-RaU**, que vous devez télécharger sur votre ordinateur.
9. Copiez le fichier d'activation de licence téléchargé sur l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite.
10. Contrôlez que le code d'activation correct est écrit dans le champ **Saisissez votre code d'activation**.
11. Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez sur le bouton **Charger et activer**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
12. Naviguez jusqu'au fichier d'activation de licence, sélectionnez-le et cliquez sur **OK**.
 - ▶ La licence contenue dans le fichier d'activation de licence est installée dans SICAT Suite sur votre ordinateur actuel.
 - ▶ La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été activée avec succès**.

17.4 RESTITUER DES LICENCES AU POOL DE LICENCES

REMARQUE

Le dossier patient doit être fermé

Vous devez fermer le dossier patient actif avant de procéder à des modifications des licences.


REMARQUE

Le panier doit être vide.

Le panier doit être vide avant de pouvoir apporter des modifications sur les licences.

Procédez de la manière suivante pour désactiver une licence complète et la restituer au pool de licences :

- ☑ Vous avez déjà activé la licence complète d'une application SICAT.
- ☑ L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
- ☑ La fenêtre **Aperçu de vos licences** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Aperçu de vos licences" [► Page 46 - Standalone]*.

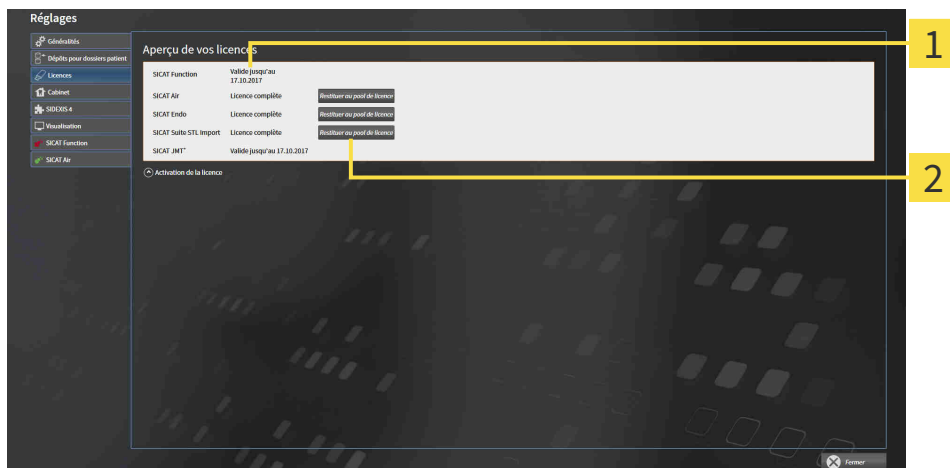

1 Statut de la licence des applications SICAT et fonctions individuelles

2 Bouton **Restituer au pool de licence**

- Dans la fenêtre **Aperçu de vos licences**, cliquez dans la ligne de l'application SICAT ou de la fonction individuelle souhaitée sur le bouton **Restituer au pool de licence**.
- La licence sélectionnée est restituée à votre pool de licences et redevient disponible pour une nouvelle activation.
- La fenêtre de notification s'ouvre avec le message suivant : **La licence a été restituée au pool de licences avec succès.**
- Sans licence, une application reste disponible en mode viewer. Si les licences de toutes les applications SICAT ont été restituées au pool de licences, SICAT Suite passe entièrement en mode viewer.



Si vous souhaitez désactiver une licence sur un ordinateur sans connexion Internet active, veuillez contacter l'assistance SICAT.

17.5 UTILISER DES CODES DE BON D'ÉCHANGE

1. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.com>.
2. Cliquez sur le lien vers SICAT Portal.
 - ▶ SICAT Portal s'ouvre.
3. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez dans la gestion des comptes sur l'entrée relative à la gestion de vos licences.
5. Saisissez votre code de bon d'échange et confirmez-le.
 - ▶ SICAT Portal génère une clé licence et ajoute la clé licence à votre clé d'activation.
6. Démarrez SICAT Suite et activez la licence.

Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer des licences via une connexion Internet active* [▶ Page 47 - Standalone] et *Activer des licences manuellement ou sans connexion Internet active* [▶ Page 49 - Standalone].



Vous trouverez une aide supplémentaire dans la FAQ dans SICAT Portal.

18 DÉPÔTS DE DOSSIERS PATIENT

SAUVEGARDE



ATTENTION

L'absence d'un procédé de sauvegarde des données des dépôts de dossiers patient peut entraîner la perte irrémédiable de données patient.

Assurez-vous qu'une sauvegarde périodique des données de tous les dépôts de dossiers patient est réalisée.

Vous êtes vous-même responsable de la sauvegarde des données patient dans les dépôts de dossiers patient. Pour connaître l'emplacement des dépôts de dossiers patient, consultez les réglages sous **Dépôts pour dossiers patient**. Lorsque vous supprimez des dépôts de dossiers patient de la liste **Vos dépôts de dossiers patient**, SICAT Suite n'affiche plus ces dépôts, bien qu'ils existent toujours sur le support de données correspondant.



Il est recommandé de sauvegarder aussi les réglages utilisateur des applications SICAT en plus des données patient. Les réglages utilisateur sont consignés, pour chaque utilisateur séparément, dans deux répertoires. Vous pouvez ouvrir ces répertoires en entrant `%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG` et `%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG` dans la barre d'adresses de l'explorateur Windows.

SÉCURITÉ DES DONNÉES



ATTENTION

L'enregistrement de données d'application SICAT dans un système de fichiers réseau non fiable peut entraîner la perte de données.

Assurez-vous, en coopération avec votre administrateur réseau, que les données d'application SICAT puissent être enregistrées en toute sécurité dans le système de fichiers réseau souhaité.



ATTENTION

L'utilisation commune de SICAT Suite et des applications SICAT intégrées avec d'autres appareils d'un réseau d'ordinateurs ou d'un réseau de stockage peut entraîner des risques jusqu'alors inconnus pour les patients, les utilisateurs et d'autres personnes.

Assurez-vous que des règles soient établies au sein de votre établissement afin de déterminer, d'analyser et d'évaluer les risques liés à votre réseau.



ATTENTION

Des risques nouveaux peuvent résulter de modifications de votre environnement réseau telles que des modifications de votre configuration réseau, la connexion d'appareils ou de composants supplémentaires à votre réseau, la déconnexion d'appareils ou de composants du réseau, ainsi que la mise à jour ou la mise à niveau d'appareils ou de composants du réseau.

Effectuez une nouvelle analyse des risques du réseau après chaque modification du réseau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



La gestion des dépôts de dossiers patient n'est disponible que lorsqu'une licence d'application est activée dans SICAT Suite.



Une nouvelle version de la version standalone de SICAT Suite a besoin de dépôts de dossiers patient actualisés. Au premier démarrage de la nouvelle version ou lorsque vous activez un dépôt de dossiers patient obsolète, SICAT Suite demande si vous voulez actualiser le dépôt de dossiers patient. Si vous confirmez le message, SICAT Suite actualise automatiquement le dépôt de dossiers patient. **ATTENTION ! Vous ne pouvez plus utiliser les dépôts de dossiers patient actualisés avec des versions antérieures de SICAT Suite.**

SICAT Suite assure la gestion des données patient de la manière suivante :

- Toutes les radiographies 3D d'un patient et tous les projets de planification correspondants sont organisés dans des dossiers patient.
- Les dossiers patient sont enregistrés dans des dépôts de dossiers patient.
- Les dépôts de dossiers patient sont enregistrés dans des dossiers d'un système de fichiers local ou d'un système de fichiers réseau.

SICAT Suite a besoin d'au moins un dépôt de dossiers patient pour fonctionner en version complète. Il est possible de gérer plusieurs dépôts de dossiers patient. Toutefois, un seul dépôt de dossiers patient peut être actif à la fois à un instant donné. Un seul logiciel SICAT Suite à la fois peut accéder aux dépôts de dossiers patient d'un système de fichiers local ou d'un système de fichiers réseau. Vous pouvez uniquement éditer et enregistrer les dossiers patient du dépôt de dossiers patient actif.



Les dépôts de dossiers patient sur systèmes de fichiers réseau nécessitent une liaison réseau d'une certaine largeur de bande minimale. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Configuration système requise* [► Page 8 - Standalone].

Les actions suivantes sont disponibles pour la gestion des dépôts de dossiers patient :

- Ouvrir la fenêtre "Dépôts de dossiers patient" [► Page 55 - Standalone]
- Ajouter des dépôts de dossiers patient [► Page 56 - Standalone]
- Activer un autre dépôt de dossiers patient [► Page 58 - Standalone]
- Supprimer un dépôt de dossiers patient [► Page 60 - Standalone]

18.1 OUVRIR LA FENÊTRE "DÉPÔTS DE DOSSIERS PATIENT"

Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Dépôts pour dossiers patient** :




1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Réglages**.

► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Dépôts pour dossiers patient**.

► La fenêtre **Dépôts pour dossiers patient** s'ouvre :

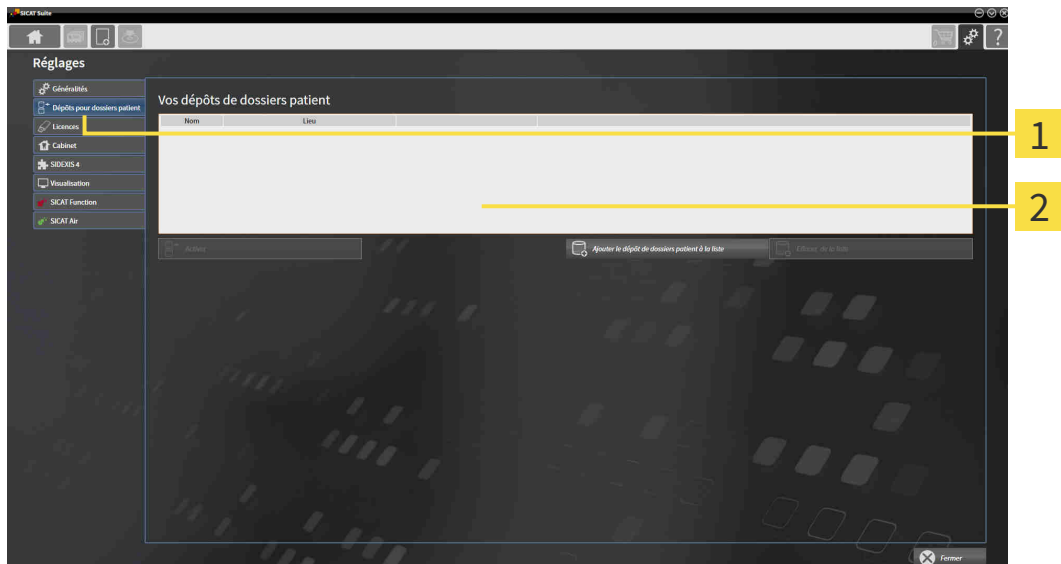

1 Onglet **Dépôts pour dossiers patient**

2 Fenêtre **Dépôts pour dossiers patient**

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Ajouter des dépôts de dossiers patient* [► Page 56 - Standalone]
- *Activer un autre dépôt de dossiers patient* [► Page 58 - Standalone]
- *Supprimer un dépôt de dossiers patient* [► Page 60 - Standalone]

18.2 AJOUTER DES DÉPÔTS DE DOSSIERS PATIENT

ATTENTION

L'absence d'un procédé de sauvegarde des données des dépôts de dossiers patient peut entraîner la perte irrémédiable de données patient.

Assurez-vous qu'une sauvegarde périodique des données de tous les dépôts de dossiers patient est réalisée.




SICAT Suite enregistre les dépôts de dossiers patient dans des systèmes de fichiers. Il ne peut enregistrer qu'un seul dépôt de dossiers patient par dossier du système de fichiers. C'est pourquoi un dossier dans lequel vous voulez enregistrer un nouveau dépôt de dossiers patient doit être vide.



SICAT Suite ajoute un dépôt de dossiers patient existant lorsque les conditions suivantes sont remplies : le dossier sélectionné contient déjà un dépôt de dossiers patient, mais n'est pas contenu dans la liste des dépôts de dossiers patient.

Procédez comme suit pour créer un nouveau dépôt de dossiers patient ou pour ajouter un dépôt de dossiers patient existant :

- ☑ La fenêtre **Dépôts pour dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Dépôts de dossiers patient"* [► Page 55 - Standalone].

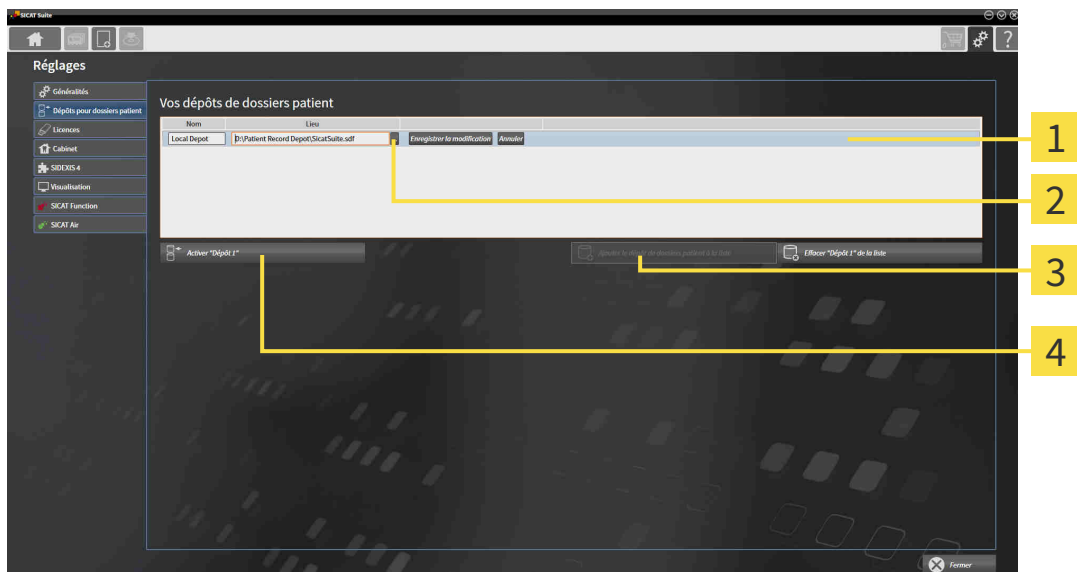

1 Ligne du nouveau dépôt de dossiers patient

3 Bouton **Ajouter le dépôt de dossiers patient à la liste**

2 Bouton **Parcourir**

4 Bouton d'activation du dépôt de dossiers patient sélectionné



- Dans la fenêtre **Dépôts pour dossiers patient**, cliquez sur le bouton **Ajouter le dépôt de dossiers patient à la liste**.
 - SICAT Suite ajoute à la liste **Vos dépôts de dossiers patient** une nouvelle ligne pour le nouveau dépôt de dossiers patient.
- Cliquez dans la ligne du nouveau dépôt de dossiers patient sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Parcourir** s'ouvre.

3. Sélectionnez dans la fenêtre **Parcourir** le dossier voulu puis cliquez sur **OK**.
 - ▶ La fenêtre **Parcourir** se ferme et SICAT Suite ajoute le chemin du dossier voulu à la ligne du nouveau dépôt de dossiers patient.
4. Cliquez dans la ligne du nouveau dépôt de dossiers patient dans le champ **Nom** et saisissez un nom bien reconnaissable pour le nouveau dépôt de dossiers patient.
5. Le nouveau dépôt de dossiers patient restant sélectionné, cliquez sur **Enregistrer la modification**.
 - ▶ Si un dossier patient est actif, un message de confirmation s'ouvre.
6. Dans le message de confirmation, cliquez sur le bouton **Changer de dépôt de dossiers patient (le dossier patient est refermé)**.
 - ▶ SICAT Suite active le nouveau dépôt de dossiers patient. Le style de police de la ligne correspondante est changé en caractères gras.
 - ▶ SICAT Suite désactive le dépôt de dossiers patient qui était activé auparavant. Le style de police de la ligne correspondante est changé en caractères normaux.



Vous pouvez cliquer sur **Annuler** pour annuler l'ajout d'un dépôt de dossiers patient.



Vous pouvez reconnaître la création d'un dépôt de dossiers patient au fichier SDF créé dans le dossier correspondant du systèmes de fichiers.

18.3 ACTIVER UN AUTRE DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT


Une modification du dépôt de dossiers patient peut s'avérer utile par exemple dans les cas suivants :



- Vous souhaitez commuter entre un dépôt de dossiers patient d'un système de fichiers réseau de votre cabinet et un dépôt de dossiers patient de votre ordinateur portable.
- Vous voulez afficher publiquement des données patient qui sont enregistrées sous forme anonyme dans un autre dépôt de dossiers patient, p. ex. à des fins de formation continue.

Procédez de la manière suivante pour activer un autre dépôt de dossiers patient :

- ☑ Aucun dossier patient n'est actif. Si un dossier patient est actif, SICAT Suite le referme automatiquement.
- ☑ Le dépôt de dossiers patient que vous voulez activer n'est pas ouvert dans SICAT Suite sur un autre ordinateur.
- ☑ La fenêtre **Dépôts pour dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Dépôts de dossiers patient"* [► Page 55 - Standalone].

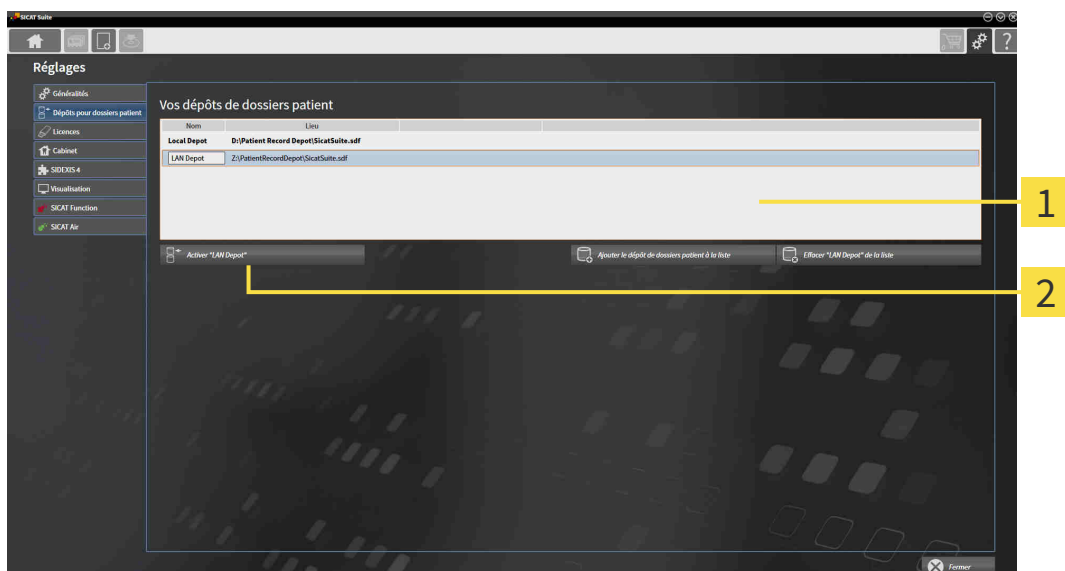

1 Liste **Vos dépôts de dossiers patient**

2 Bouton d'activation du dépôt de dossiers patient sélectionné

1. Dans la fenêtre **Dépôts pour dossiers patient**, cliquez dans la liste **Vos dépôts de dossiers patient** sur le dépôt de dossiers patient voulu.



2. Cliquez sur le bouton d'activation du dépôt de dossiers patient sélectionné.

► Si un dossier patient est actif, un message de confirmation s'ouvre.

3. Dans le message de confirmation, cliquez sur le bouton **Changer de dépôt de dossiers patient (le dossier patient est refermé)**.

► SICAT Suite active le dépôt de dossiers patient sélectionné.



Une nouvelle version de la version standalone de SICAT Suite a besoin de dépôts de dossiers patient actualisés. Au premier démarrage de la nouvelle version ou lorsque vous activez un dépôt de dossiers patient obsolète, SICAT Suite demande si vous voulez actualiser le dépôt de dossiers patient. Si vous confirmez le message, SICAT Suite actualise automatiquement le dépôt de dossiers patient. **ATTENTION ! Vous ne pouvez plus utiliser les dépôts de dossiers patient actualisés avec des versions antérieures de SICAT Suite.**


18.4 SUPPRIMER UN DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT



SICAT Suite retire uniquement un dépôt de dossiers patient de la liste **Vos dépôts de dossiers patient**. Il ne supprime pas les dépôts de dossiers patient dans le système de fichiers. Vous pouvez à nouveau ajouter un dépôt de dossiers patient existant qui a été retiré de la liste **Vos dépôts de dossiers patient**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ajouter des dépôts de dossiers patient* [► Page 56 - Standalone].

Procédez de la manière suivante pour supprimer un dépôt de dossiers patient de la liste **Vos dépôts de dossiers patient** :

- Aucun dossier patient n'est ouvert.
- La fenêtre **Dépôts pour dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Dépôts de dossiers patient"* [► Page 55 - Standalone].

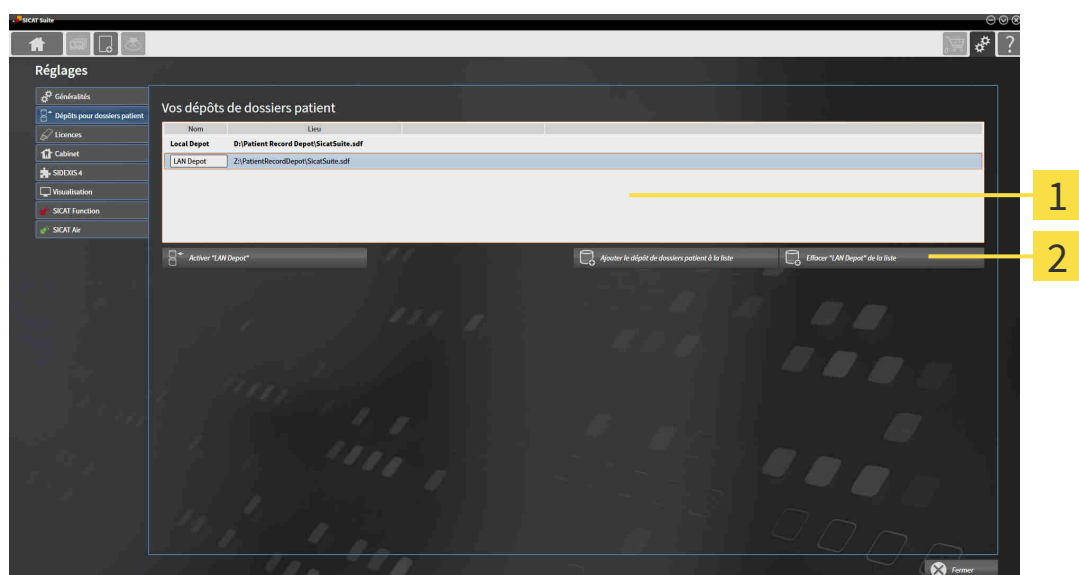

1 Liste **Vos dépôts de dossiers patient**

2 Bouton de suppression du dépôt de dossiers patient sélectionné

1. Dans la fenêtre **Dépôts pour dossiers patient**, cliquez dans la liste **Vos dépôts de dossiers patient** sur le dépôt de dossiers patient voulu.



2. Cliquez sur le bouton de suppression du dépôt de dossiers patient sélectionné.

► SICAT Suite supprime le dépôt de dossiers patient sélectionné de la liste **Vos dépôts de dossiers patient**.

19 IMPORTATION DE DONNÉES



ATTENTION

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

La suppression des données originales peut entraîner une perte de données.

Ne supprimez pas les données originales après l'importation.



L'importation de données n'est disponible que si une licence est activée et qu'un dépôt de dossiers patient est créé et activé. En l'absence de licence ou de dépôt de dossiers patient, vous ne pouvez ouvrir les données qu'en mode viewer. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir les données en mode de lecture seule* [► Page 230 - Standalone].

SICAT Suite peut importer des radiographies 3D dans les formats de données suivants :

- Données DICOM SICAT Suite
- Radiographies 3D (DICOM, vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Format DICOM supporté* [► Page 63 - Standalone])
- Données SICAT Implant
- Données de commande de guides chirurgicaux SICAT
- Données GALILEOS Wrap&Go

Deux réglages définissent la manière dont SICAT Suite importe les radiographies 3D dans le dépôt de dossiers patient actif :

- Les réglages d'importation définissent si SICAT Suite importe une radiographie 3D, ne l'importe pas, écrase une radiographie 3D existante ou crée une copie.
- Les réglages d'affectation définissent le dossier patient auquel SICAT Suite affecte une radiographie 3D importée.

Si un jeu de données comprend des études des applications SICAT, SICAT Suite importe ces études en même temps que les radiographies 3D.

RÉGLAGES D'IMPORTATION POUR LES RADIOGRAPHIES 3D

Si le dépôt de dossiers patient actif contient des dossiers patient, vous pouvez choisir entre différents réglages pour l'importation des radiographies 3D. Les réglages d'importation disponibles sont différents selon que l'ID des données à importer correspond ou non à l'ID d'un dossier patient du dépôt actif.

Vous pouvez choisir un réglage d'importation pour chaque radiographie 3D :

TYPE DE DONNÉES	L'ID CORRESPOND	L'ID NE CORRESPOND PAS	TOUJOURS DISPONIBLE
Données DICOM SICAT Suite Données SICAT Implant Données de commande de guides chirurgicaux SICAT	Écraser les données existantes – SICAT Suite importe la radiographie 3D et écrase les données existantes ayant la même ID.	Ajouter – SICAT Suite importe la radiographie 3D en tant que nouvelles données.	Ne pas ajouter – SICAT Suite n'importe pas la radiographie 3D.
Données DICOM de fournisseurs tiers Données Galileos Wrap&Go	Ajouter une copie – SICAT Suite importe la radiographie 3D en tant que copie de données existantes.	Ajouter – SICAT Suite importe la radiographie 3D en tant que nouvelles données.	Ne pas ajouter – SICAT Suite n'importe pas la radiographie 3D.

COMPARAISON DES ATTRIBUTS POUR L'AFFECTATION AU DOSSIER PATIENT

SICAT Suite analyse différents attributs des données à importer. Ces attributs sont les suivants :

- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- ID patient, par exemple le numéro de sécurité sociale ou un ID patient interne de votre cabinet

RÉGLAGES POUR L'AFFECTATION AU DOSSIER PATIENT

La liste suivante indique l'option d'importation proposée par SICAT Suite en fonction de la comparaison des attributs :

- Tous les attributs des données à importer correspondent aux attributs d'un dossier patient du dépôt actif : SICAT Suite propose l'option **Ajouter à un dossier patient existant** et le dossier patient correspondant.
- Tous les attributs des données à importer ne correspondent pas aux attributs d'un dossier patient du dépôt actif : SICAT Suite propose l'option **Créer un nouveau dossier patient**.

Dans les deux cas, vous pouvez affecter les données manuellement à un autre dossier patient.

Pour importer des données, effectuez les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

- Sélectionner les données à importer [▶ Page 64 - Standalone]
- Sélectionner une option d'importation [▶ Page 66 - Standalone]
- Affecter les données à un dossier patient existant [▶ Page 68 - Standalone]

ou

- Créer un nouveau dossier patient par importation de données [▶ Page 67 - Standalone]

19.1 FORMAT DICOM SUPPORTÉ

Lors de l'importation des données DICOM, SICAT Suite prend en charge les données qui répondent aux critères suivants :

- Les données sont disponibles au format DICOM 3.0.
- Les données ne contiennent que des coupes parallèles.
- Les données sont non compressées, compressées JPEG ou compressées JPEG 2000.
- Les données correspondent à un type supporté de la liste suivante.


Les types de données supportés sont les suivants :

- CT Image
- Digital X-Ray Image
- Digital Intraoral X-Ray Image
- X-Ray 3D Craniofacial Image
- Secondary Capture Image (grayscale) (uniquement pour modalité CT)
- Multiframe Grayscale Word Secondary Capture Image (uniquement pour modalité CT)

Vous trouverez des critères supplémentaires dans la déclaration de conformité DICOM, mise à disposition par SICAT sur demande. Vous trouverez les données de contact au dos.

19.2 SÉLECTIONNER LES DONNÉES À IMPORTER


ATTENTION  **Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.**
N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.

ATTENTION  **Des appareils de radiographie non conformes à DICOM peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.**
N'utilisez que des radiographies 3D d'appareils de radiographie munis d'une déclaration de conformité DICOM.

Procédez de la manière suivante pour importer des données dans le dépôt de dossiers patient actif :



1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Nouvelles données**.
▶ La fenêtre **Nouvelles données** s'ouvre :

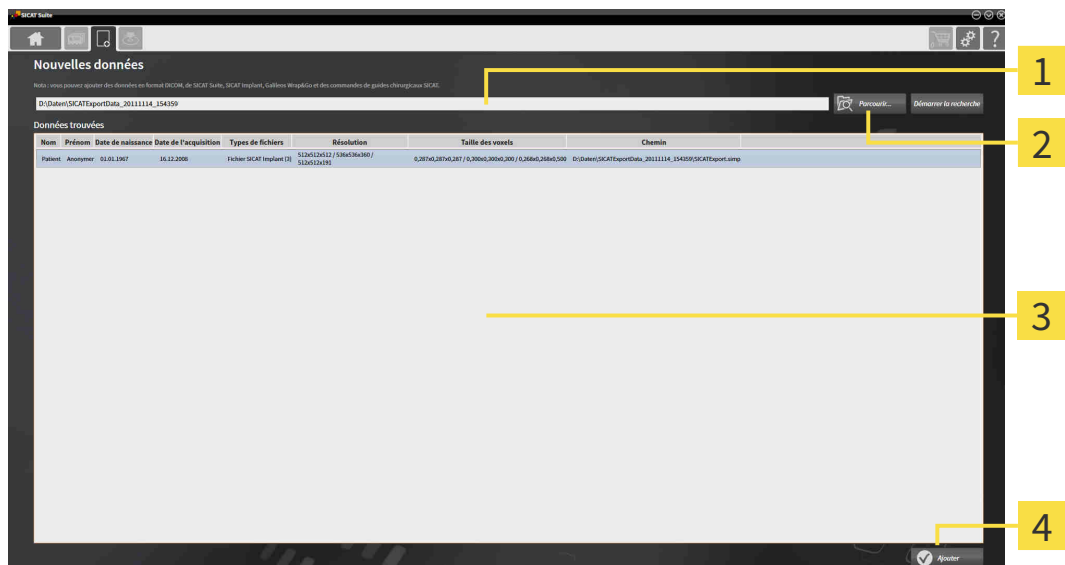

- 1** Champ **Où se trouvent les données**
- 2** Bouton **Parcourir**
- 3** Liste **Données trouvées**
- 4** Bouton **Ajouter**



2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
▶ La fenêtre **Sélectionner le fichier ou le répertoire** s'ouvre.

3. Sélectionnez dans la fenêtre **Sélectionner le fichier ou le répertoire** le fichier ou le dossier voulu puis cliquez sur **OK**.
- ▶ SICAT Suite ferme la fenêtre **Sélectionner le fichier ou le répertoire** et reporte le chemin du fichier ou du dossier sélectionné dans le champ **Où se trouvent les données**.
- ▶ Si vous avez sélectionné un fichier compatible, SICAT Suite affiche le contenu du fichier dans la liste **Données trouvées**.
- ▶ Si vous avez sélectionné un dossier, SICAT Suite parcourt le dossier et tous les sous-dossiers. SICAT Suite affiche dans la liste **Données trouvées** les fichiers compatibles qui sont contenus dans un des dossiers parcourus.



Vous pouvez également utiliser la fonction glisser-déposer pour importer des données dans SICAT Suite.



Si vous utilisez la procédure décrite, la recherche démarre automatiquement. Vous pouvez annuler la recherche en cliquant sur le bouton **Arrêter la recherche**. Si vous entrez manuellement un chemin de fichier ou de dossier dans le champ **Où se trouvent les données**, vous devez cliquer sur le bouton **Démarrer la recherche**. Celui-ci est également utile pour redémarrer une recherche dans le cas où le contenu du dossier a changé ou si vous avez terminé la recherche par inadvertance.



Si SICAT Suite ne trouve pas certains fichiers malgré la compatibilité, ceci peut être dû à des chemins trop longs de ces fichiers. Copiez les fichiers à un niveau hiérarchique supérieur du système de fichiers et redémarrez la recherche.


Poursuivez au paragraphe mit *Sélectionner une option d'importation* [▶ Page 66 - Standalone].

19.3 SÉLECTIONNER UNE OPTION D'IMPORTATION

Procédez de la manière suivante pour sélectionner une option d'importation pour chaque étude :



1. Sélectionnez l'étude souhaitée dans la liste **Données trouvées** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.
 ► La fenêtre **Ajouter** s'ouvre :

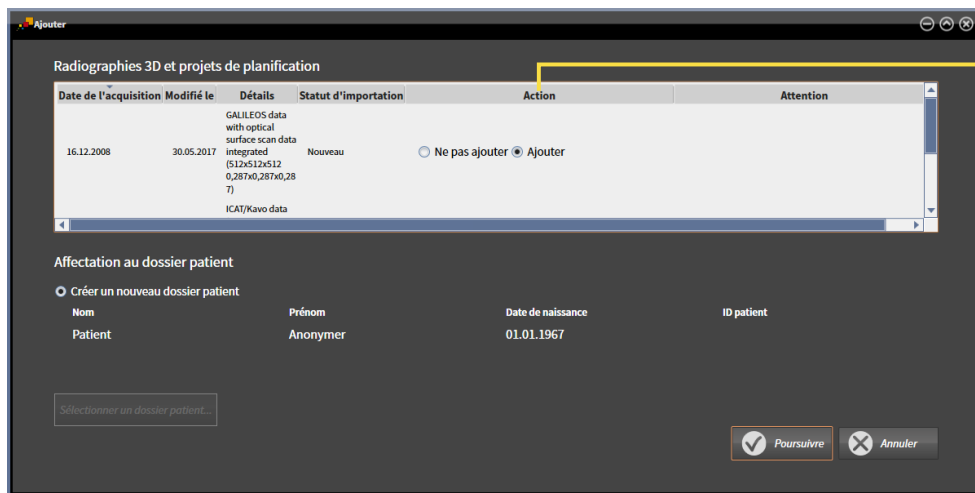

1 Colonne **Action**

2. Dans la fenêtre **Ajouter**, sélectionnez dans la colonne **Action** une des entrées suivantes pour chaque étude : **Ne pas ajouter**, **Ajouter une copie**, **Ajouter** ou **Écraser les données existantes**. Vous trouverez une description détaillée des options sous *Importation de données* [► Page 61 - Standalone]

► Vous avez défini pour chaque étude si vous voulez l'importer ou ne pas l'importer.


Poursuivez avec une des actions suivantes :

- Affecter les données à un dossier patient existant [► Page 68 - Standalone]
- Créer un nouveau dossier patient par importation de données [► Page 67 - Standalone]

19.4 CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER PATIENT PAR IMPORTATION DE DONNÉES



Vous pouvez créer un nouveau dossier patient en important des données sous réserve qu'il n'existe pas encore de dossier patient ayant la même combinaison d'attributs dans le dépôt de dossiers patient.

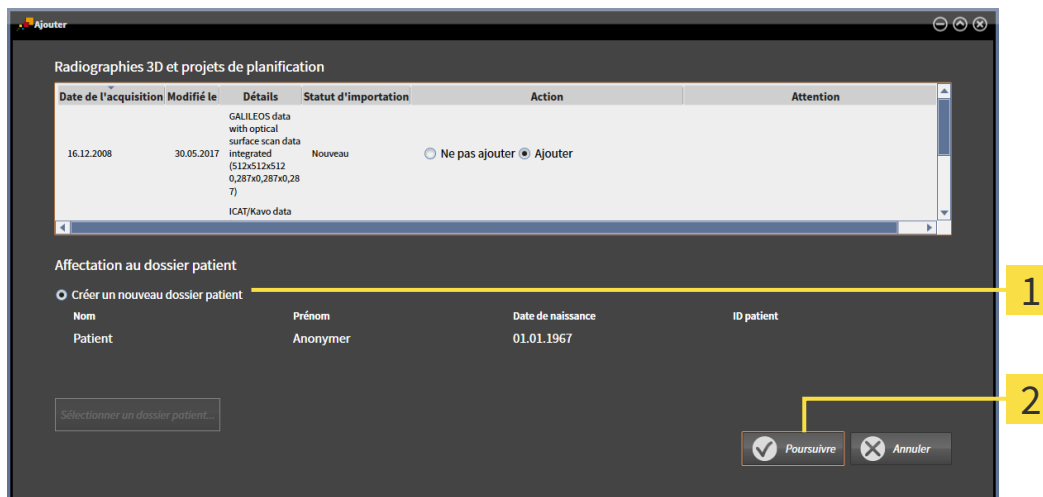


1 Option **Créer un nouveau dossier patient**

2 Bouton **Poursuivre**


Procédez de la manière suivante pour affecter des données à importer à un nouveau dossier patient :


- Dans la zone **Affectation au dossier patient**, sélectionnez l'option **Créer un nouveau dossier patient** puis cliquez sur le bouton **Poursuivre**.
- ▶ SICAT Suite crée un nouveau dossier patient avec les attributs des données sélectionnées.
- ▶ SICAT Suite importe les données sélectionnées et les affecte au nouveau dossier patient.
- ▶ La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** s'ouvre et SICAT Suite met le dossier patient importé en relief dans la liste **Dossiers patient**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Dossiers patient* [▶ Page 71 - Standalone].

19.5 AFFECTER LES DONNÉES À UN DOSSIER PATIENT EXISTANT

ATTENTION  **Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.**

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.

 SICAT Suite sélectionne automatiquement l'option **Ajouter à un dossier patient existant** ainsi que le dossier patient correspondant lorsque la condition suivante est remplie : tous les attributs des données à importer correspondent aux attributs d'un dossier patient du dépôt actif.

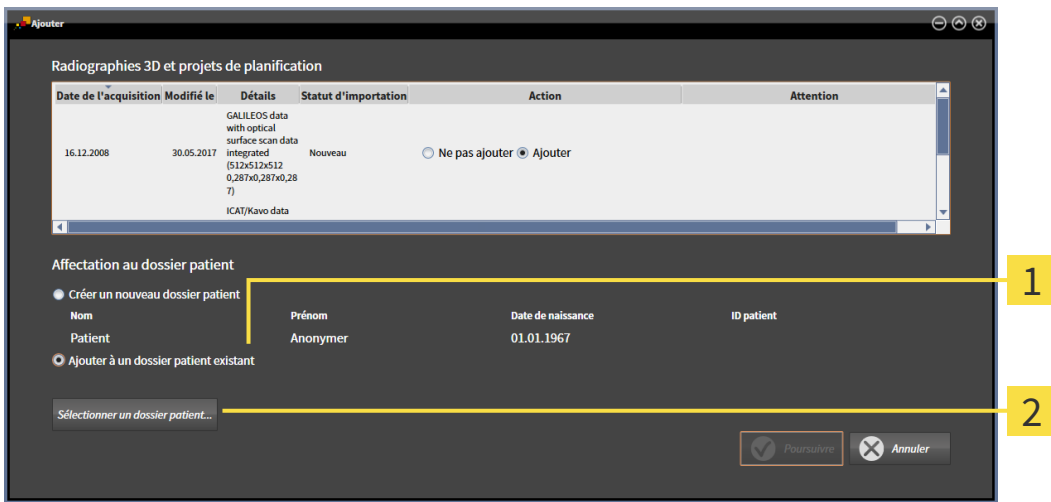

1 Option **Ajouter à un dossier patient existant**


2 Bouton **Sélectionner un dossier patient**

Procédez de la manière suivante pour affecter manuellement des données à importer à un dossier patient existant :

Le dépôt de dossiers patient actif contient au moins un dossier patient.

1. Dans la zone **Affectation au dossier patient**, sélectionnez l'option **Ajouter à un dossier patient existant** puis cliquez sur le bouton **Sélectionner un dossier patient**.

- La fenêtre **Sélectionner un dossier patient** s'ouvre et affiche une liste des dossiers patient existants :

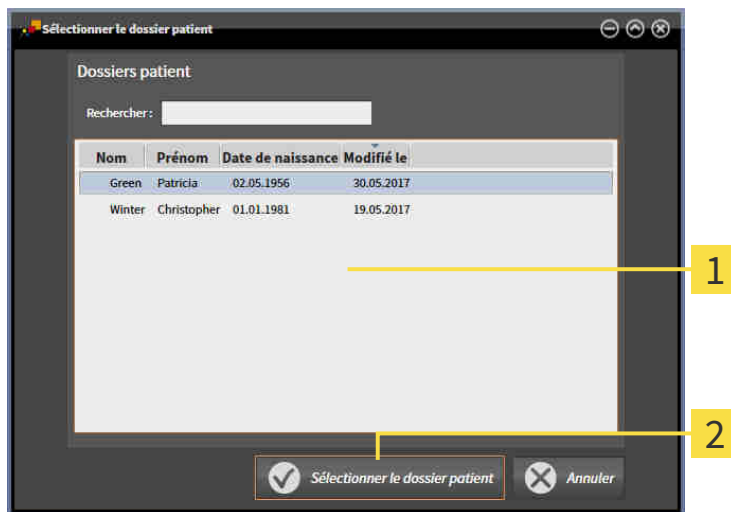


1 Liste **Dossiers patient**

2 Bouton **Sélectionner un dossier patient**

2. Cliquez sur le dossier patient voulu puis cliquez sur le bouton **Sélectionner un dossier patient**.

- La fenêtre **Sélectionner un dossier patient** se ferme.
- La fenêtre **Ajouter** affiche les attributs du dossier patient sélectionné.

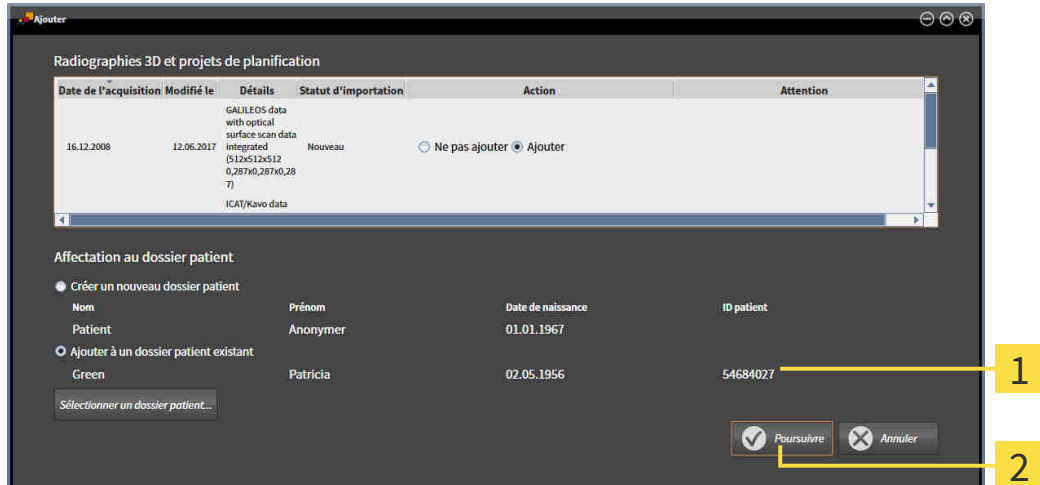


1 Attributs du dossier patient sélectionné

2 Bouton **Poursuivre**

3. Dans la fenêtre **Ajouter**, cliquez sur le bouton **Poursuivre**.

4. Si les attributs des données à importer ne correspondent pas aux attributs du dossier patient sélectionné, un message d'avertissement s'affiche :

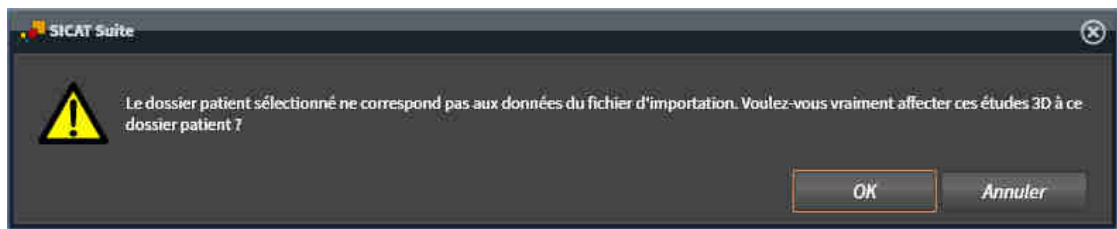

5. Si vous voulez importer les données malgré cela, cliquez sur **OK**.
 - ▶ SICAT Suite importe les données sélectionnées et les affecte à un dossier patient existant.
 - ▶ La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** s'ouvre et SICAT Suite met le dossier patient importé en relief dans la liste **Dossiers patient**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Dossiers patient* [▶ Page 71 - Standalone].

20 DOSSIERS PATIENT

Les dossiers patient peuvent contenir plusieurs études 3D. Une étude se compose d'une radiographie 3D et des projets de planification correspondants. Les dossiers patient peuvent en outre contenir des documents générés au cours de la planification.

Les actions suivantes sont disponibles pour la gestion des dossiers patient :

- *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient" [▶ Page 72 - Standalone]*
- *Rechercher et trier les dossiers patient dans le dépôt [▶ Page 73 - Standalone]*
- *Activer les dossiers patient [▶ Page 75 - Standalone]*
- *Ouvrir des radiographies 3D ou des projets de planification à partir de la vue d'ensemble des dossiers patient [▶ Page 79 - Standalone]*
- *Travailler avec des dossiers patient actifs [▶ Page 76 - Standalone]*
- *Modifier les attributs de dossiers patient [▶ Page 78 - Standalone]*
- *Supprimer des dossiers patient des dépôts [▶ Page 85 - Standalone]*
- *Supprimer des radiographies 3D ou des projets de planification de dossiers patient [▶ Page 87 - Standalone]*

Des actions sont également disponibles pour l'importation de données dans les dossiers patient et pour l'exportation de données des dossiers patient :


- *Importation de données [▶ Page 61 - Standalone]*
- *Exportation de données [▶ Page 196 - Standalone]*

20.1 OUVRIR LA FENÊTRE "VUE D'ENSEMBLE DES DOSSIERS PATIENT"

Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** :




- Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Dossiers patient**.
- ▶ La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** s'ouvre :

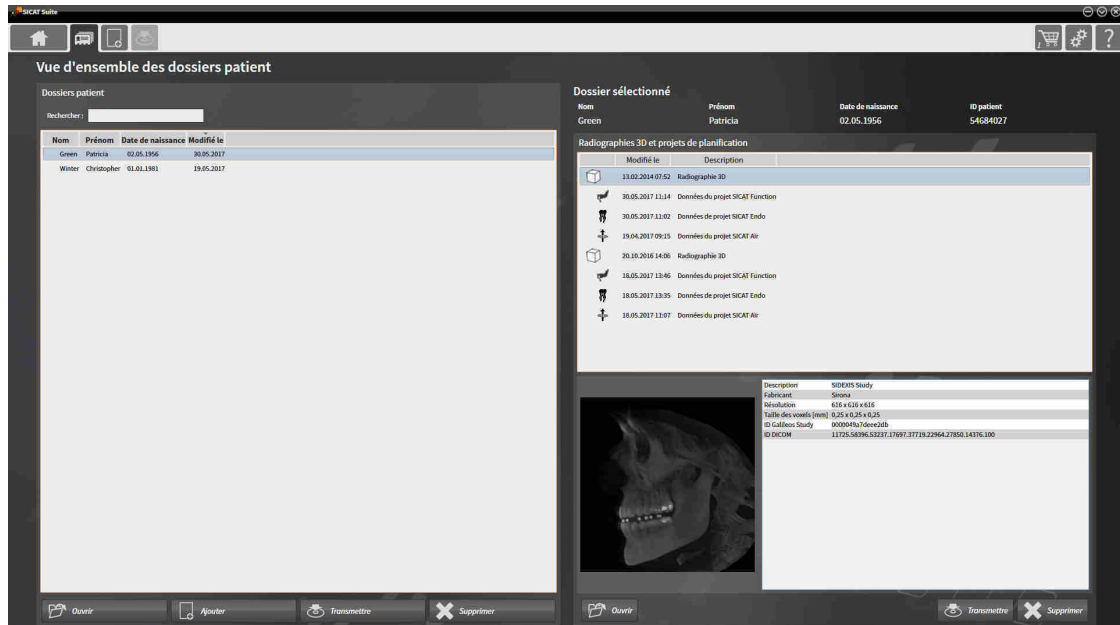

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Rechercher et trier les dossiers patient dans le dépôt [▶ Page 73 - Standalone]*
- *Activer les dossiers patient [▶ Page 75 - Standalone]*
- *Ouvrir des radiographies 3D ou des projets de planification à partir de la vue d'ensemble des dossiers patient [▶ Page 79 - Standalone]*
- *Travailler avec des dossiers patient actifs [▶ Page 76 - Standalone]*
- *Modifier les attributs de dossiers patient [▶ Page 78 - Standalone]*
- *Supprimer des dossiers patient des dépôts [▶ Page 85 - Standalone]*
- *Supprimer des radiographies 3D ou des projets de planification de dossiers patient [▶ Page 87 - Standalone]*

20.2 RECHERCHER ET TRIER LES DOSSIERS PATIENT DANS LE DÉPÔT

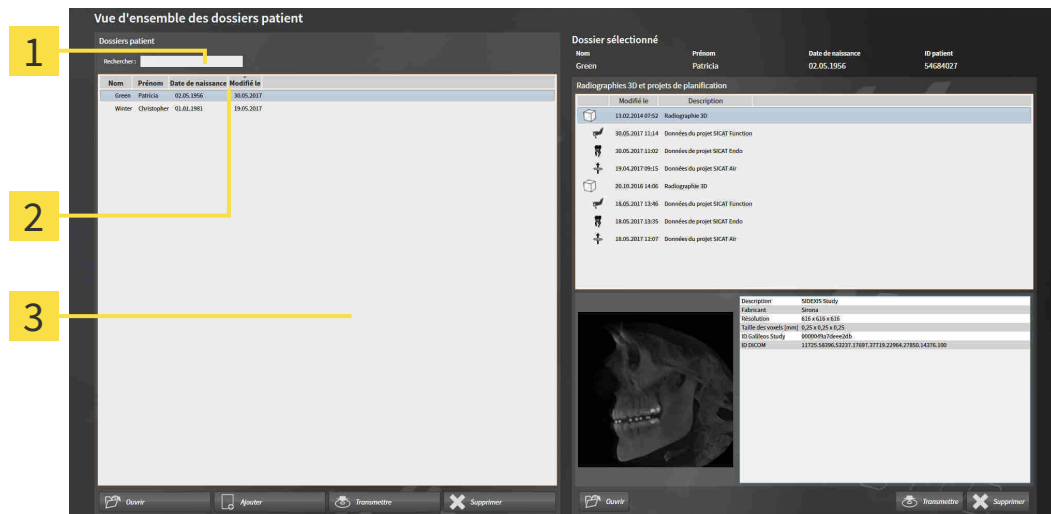

- 1 Champ **Rechercher**
- 2 Titre de la colonne avec attributs
- 3 Liste **Dossiers patient**

RECHERCHER DES DOSSIERS PATIENT

SICAT Suite recherche le texte saisi dans les attributs de tous les dossiers patient.

Procédez de la manière suivante pour rechercher un dossier patient :

- ☑ La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"* [► Page 72 - Standalone].
 - Saisissez le texte recherché dans le champ **Rechercher**.
- La liste **Dossiers patient** affiche tous les dossiers patient qui contiennent le texte recherché dans un des attributs.

SICAT Suite démarre la recherche dès que vous commencez la saisie.

TRIER LES DOSSIERS PATIENT SELON DES ATTRIBUTS

Vous pouvez trier les dossiers patient en fonction des attributs suivants :

- **Nom**
- **Prénom**
- **Date de naissance**
- **Modifié le**

Procédez de la manière suivante pour trier des dossiers patient selon des attributs :

- ☑ La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"* [▶ *Page 72 - Standalone*].



1. Cliquez dans la liste **Dossiers patient** sur le titre de la colonne de l'attribut souhaité.
▶ SICAT Suite trie la liste **Dossiers patient** dans l'ordre de l'attribut souhaité.
2. Cliquez une nouvelle fois dans la liste **Dossiers patient** sur le titre de la colonne de l'attribut souhaité.
▶ SICAT Suite trie la liste **Dossiers patient** dans l'ordre inverse de l'attribut souhaité.




Par défaut, les dossiers patient sont classés dans l'ordre décroissant de la date de modification.

20.3 ACTIVER LES DOSSIERS PATIENT

Activez un dossier de la manière suivante pour pouvoir l'utiliser :

- ☑ La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"* [► Page 72 - Standalone].

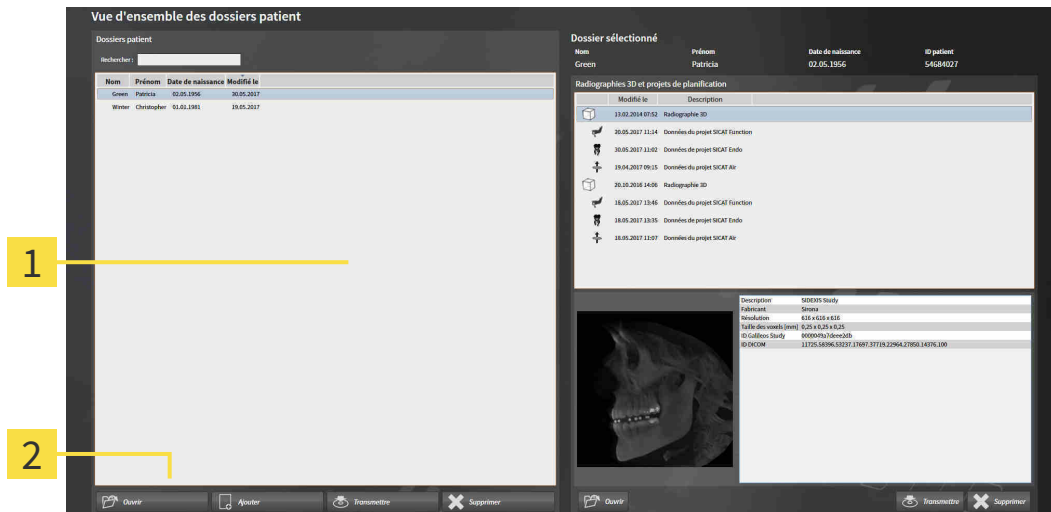


1 Liste **Dossiers patient**

2 Bouton d'activation du dossier patient sélectionné


1. Sélectionnez le dossier patient souhaité dans la liste **Dossiers patient**.
 2. Cliquez sur le bouton d'activation du dossier patient sélectionné.
- SICAT Suite active le dossier patient sélectionné.

Poursuivez au paragraphe *Travailler avec des dossiers patient actifs* [► Page 76 - Standalone]

20.4 TRAVAILLER AVEC DES DOSSIERS PATIENT ACTIFS

ATTENTION  **Les dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification supprimés ne peuvent pas être restaurés.**


Ne supprimez des dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin de ces données.

ATTENTION  **Lorsque vous supprimez des radiographies 3D, tous les projets de planification qui en dépendent sont également supprimés.**

Ne supprimez des radiographies 3D que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des projets de planification qui en dépendent.

Procédez de la manière suivante pour travailler avec un dossier patient :

- Un dossier patient est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer les dossiers patient* [▶ Page 75 - Standalone].

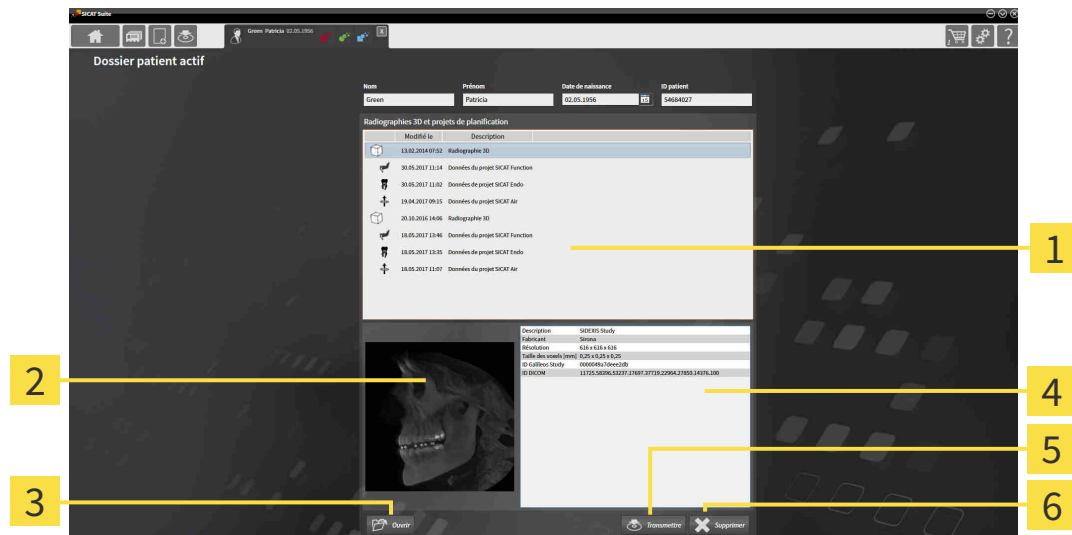

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Liste Radiographies 3D et projets de planification | 4 Zone Détails |
| 2 Zone Vue d'ensemble | 5 Bouton Transmettre |
| 3 Bouton Ouvrir | 6 Bouton Supprimer |

1. Dans la fenêtre **Dossier patient actif**, sélectionnez dans la liste **Radiographies 3D et projets de planification** la radiographie 3D ou le projet de planification souhaité(e).
 - ▶ La zone **Vue d'ensemble** affiche un aperçu de la radiographie 3D ou du projet de planification sélectionné(e).
 - ▶ La zone **Détails** affiche des détails de la radiographie 3D ou du projet de planification sélectionné(e), par ex. des métadonnées DICOM.
2. Pour ouvrir la radiographie 3D sélectionnée dans une application SICAT ou pour ouvrir le projet de planification sélectionné de l'application SICAT correspondante, cliquez sur le bouton **Ouvrir**.



3. Pour ouvrir le document sélectionné dans le viewer PDF standard, cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
4. Pour exporter l'étude sélectionnée à partir du dossier patient actif, cliquez sur le bouton **Transmettre**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exportation de données* [► Page 196 - Standalone].
5. Pour supprimer la radiographie 3D ou le projet de planification sélectionné(e) du dossier patient actif, cliquez sur le bouton **Supprimer**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Supprimer des radiographies 3D ou des projets de planification de dossiers patient* [► Page 87 - Standalone].
6. Pour modifier les attributs du dossier patient actif, reportez vous à *Modifier les attributs de dossiers patient* [► Page 78 - Standalone].



Si vous ouvrez une radiographie 3D sans étude correspondante et que vous avez activé la licence d'une seule application SICAT, cette application SICAT va démarrer. Si vous ouvrez une radiographie 3D correspondant à plusieurs études et que vous avez activé les licences de plusieurs applications SICAT, c'est l'application SICAT dont l'étude a été modifiée en dernier qui démarrera.

20.5 MODIFIER LES ATTRIBUTS DE DOSSIERS PATIENT




La combinaison d'attributs de chaque dossier patient du dépôt actif doit être unique.

Vous pouvez modifier les attributs suivants d'un dossier patient :

- **Nom**
- **Prénom**
- **Date de naissance**
- **ID patient**

Procédez de la manière suivante pour modifier les attributs d'un dossier patient :

- Un dossier patient est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Activer les dossiers patient* [► Page 75 - Standalone].

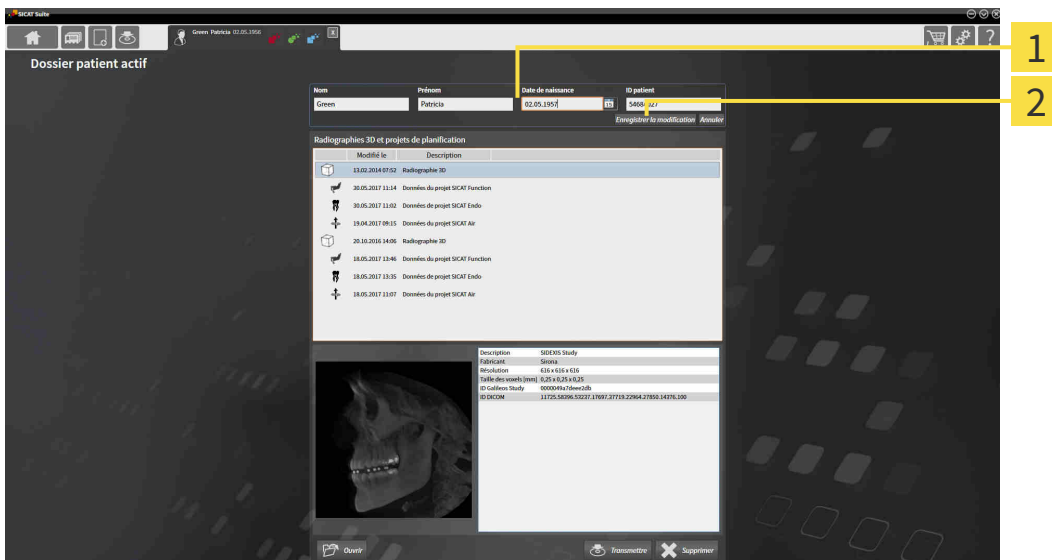

1 Champs d'attributs

2 Bouton **Enregistrer la modification**

1. Dans la fenêtre **Dossier patient actif**, saisissez les valeurs voulues dans les champs des attributs.
 2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer la modification**.
- SICAT Suite enregistre vos modifications.



L'ID patient ne correspond pas à l'ID DICOM. Vous pouvez entrer l'ID de votre choix comme ID patient, par exemple le numéro de sécurité sociale ou un ID patient interne de votre cabinet.

20.6 OUVRIR DES RADIOGRAPHIES 3D OU DES PROJETS DE PLANIFICATION À PARTIR DE LA VUE D'ENSEMBLE DES DOSSIERS PATIENT

ATTENTION

Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.

ATTENTION

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.


ATTENTION

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir une radiographie 3D ou un projet de planification à partir de la **Vue d'ensemble des dossiers patient** :

- La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"* [► Page 72 - Standalone].

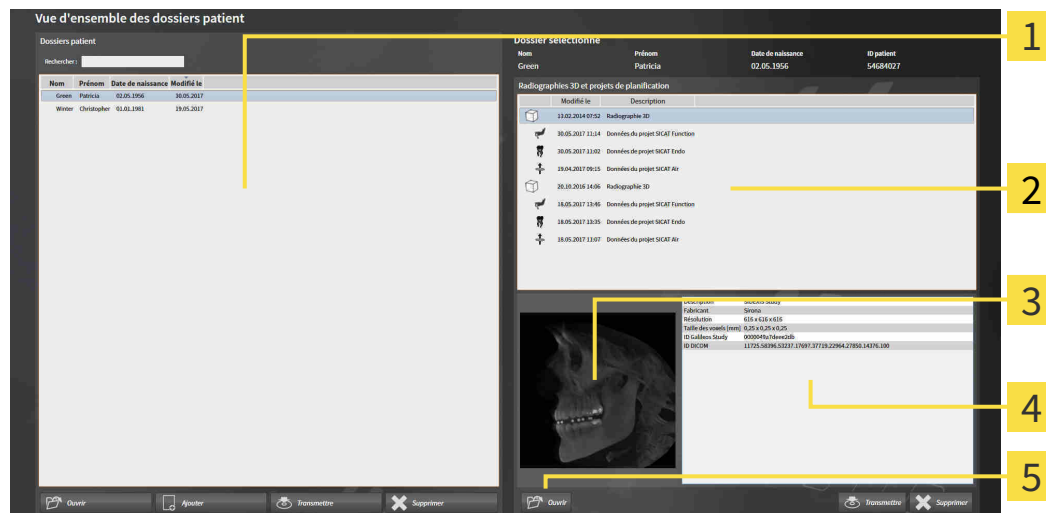

1 Liste **Dossiers patient**

2 Liste **Radiographies 3D et projets de planification**

3 Zone **Vue d'ensemble**

4 Zone **Détails**

5 Bouton **Ouvrir**

1. Dans la fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient**, sélectionnez le dossier patient souhaité dans la liste **Dossiers patient**.
 - ▶ Dans la zone **Dossier sélectionné**, la liste **Radiographies 3D et projets de planification** affiche toutes les radiographies 3D, tous les projets de planification et tous les fichiers PDF du dossier patient sélectionné.
2. Sélectionnez l'ensemble de données ou le document souhaité dans la liste **Radiographies 3D et projets de planification**.
 - ▶ Les zones **Vue d'ensemble** et **Détails** affichent des informations relatives à l'ensemble de données ou au document sélectionné.



3. Cliquez sur le bouton **Ouvrir**.

- ▶ Si vous avez sélectionné un ensemble de données, celui-ci est ouvert dans une application SICAT.



- ▶ Si vous avez sélectionné un document, celui-ci est ouvert dans le viewer PDF standard.



Si vous ouvrez une radiographie 3D sans étude correspondante et que vous avez activé la licence d'une seule application SICAT, cette application SICAT va démarrer. Si vous ouvrez une radiographie 3D correspondant à plusieurs études et que vous avez activé les licences de plusieurs applications SICAT, c'est l'application SICAT dont l'étude a été modifiée en dernier qui démarrera.

20.7 ÉTUDES SICAT FUNCTION DANS SICAT SUITE

**ATTENTION**

Des appareils de radiographie non conformes à DICOM peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que des radiographies 3D d'appareils de radiographie munis d'une déclaration de conformité DICOM.

**ATTENTION**

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.

**ATTENTION**

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.

**ATTENTION**

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.

**ATTENTION**

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

REMARQUE

Afin de garantir un diagnostic, un traitement et un recalage corrects des données de mouvement de la mâchoire, SICAT recommande d'utiliser des données de radiographie 3D avec les paramètres suivants :

1. Épaisseur de coupe inférieure à 0,7 mm
2. Taille des voxels inférieure à 0,7 mm dans les trois dimensions

La **Vue d'ensemble des dossiers patient** affiche des informations relatives aux études SICAT Function, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

- Vous utilisez SICAT Suite en version standalone.
- Vous avez sélectionné une étude SICAT Function dans la zone **Radiographies 3D et projets de planification** :

Dossier sélectionné

Nom	Prénom	Date de naissance	ID patient
Green	Patricia	02.05.1956	54684027

Radiographies 3D et projets de planification

Modifié le	Description
20.10.2016 14:06	Radiographie 3D
30.05.2017 13:27	Données du projet SICAT Function
30.05.2017 13:25	Données de projet SICAT Endo
19.04.2017 09:15	Données du projet SICAT Air

Données de surface

Données de surface	Existant
Empreinte JMT	Existant (13.02.2014)
Segmentation de l'articulation temporo-mandibulaire	Existant (30.05.2017)
Commande	Existant (30.05.2017)
Statut de la commande	En cours de traitement


Ouvrir Transmettre Supprimer

1 Étude SICAT Function sélectionnée

2 Zone **Vue d'ensemble**

3 Zone **Détails**

La zone **Vue d'ensemble** affiche les éléments suivants :

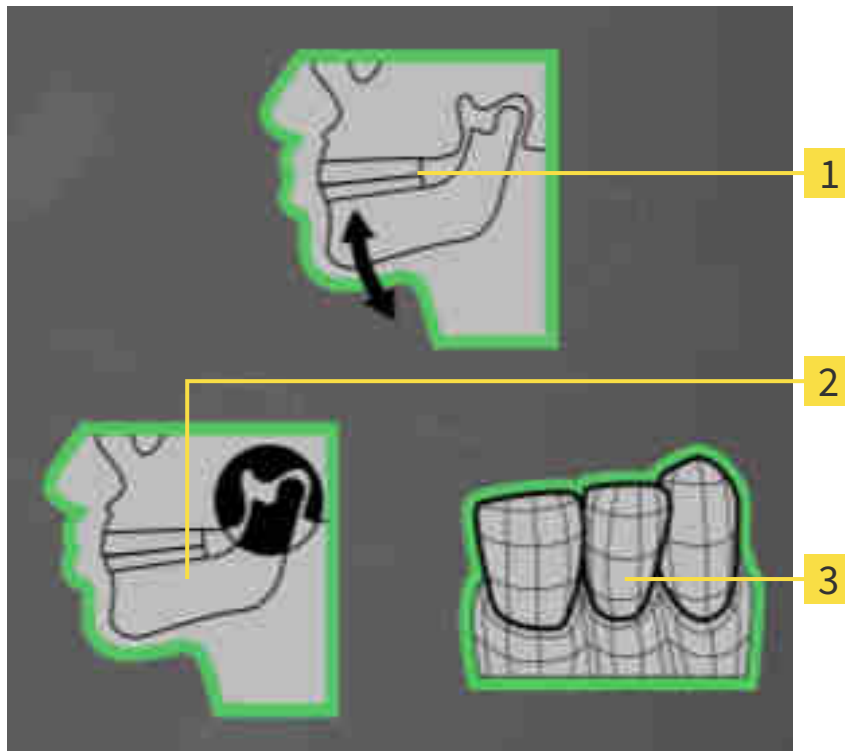

1 Données de mouvement

2 Segmentation

3 Empreintes optiques

Une bordure verte signifie que l'élément en question est disponible dans l'étude.

La zone **Détails** affiche les informations suivantes :

- Disponibilité d'empreintes optiques
- Disponibilité de données de mouvement de la mâchoire avec date d'acquisition
- Disponibilité d'une segmentation de l'articulation temporo-mandibulaire avec date de création
- Disponibilité d'une commande avec statut et date

20.8 FERMER UN DOSSIER DE PATIENT ACTIF ET ENREGISTRER LES PROJETS DE PLANIFICATION CONTENUS



Procédez de la manière suivante pour fermer un dossier de patient actif et enregistrer les projets de planification qu'il contient :



- Dans la zone du dossier patient actif, cliquez sur le bouton **Fermer**.
- ▶ SICAT Suite ferme le dossier patient actif et enregistre les modifications apportées aux projets de planification.

20.9 SUPPRIMER DES DOSSIERS PATIENT DES DÉPÔTS


ATTENTION

Lorsque vous supprimez des dossiers patient, toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification qui y sont contenus sont également supprimés.

Ne supprimez des dossiers patient que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des radiographies 3D, des projets de planification et des fichiers PDF qu'ils contiennent.

Procédez de la manière suivante pour supprimer un dossier patient ainsi que toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification qu'il contient :

- La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"* [► Page 72 - Standalone].

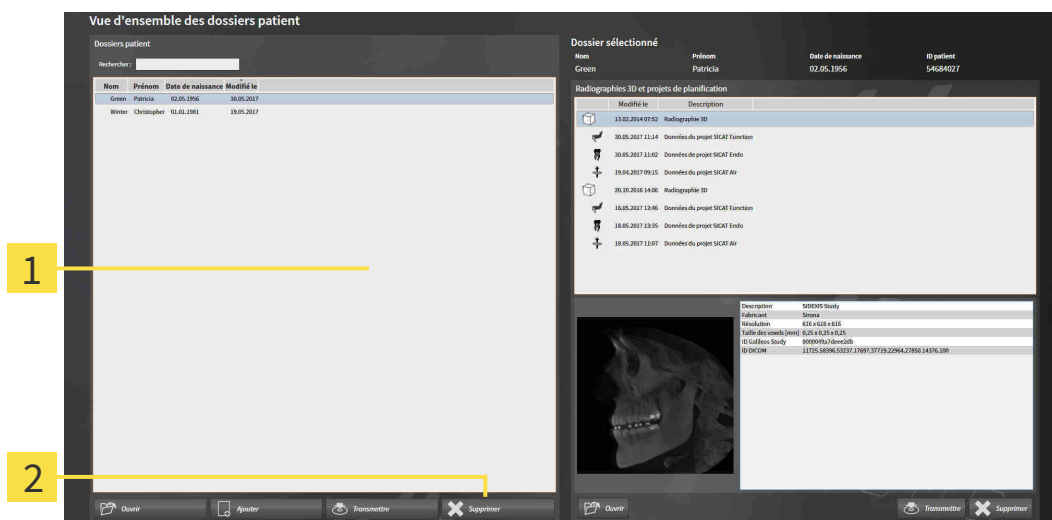

1 Liste **Dossiers patient**


2 Bouton de suppression du dossier patient sélectionné

1. Dans la fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient**, sélectionnez le dossier patient souhaité dans la liste **Dossiers patient**.



2. Cliquez sur le bouton de suppression du dossier patient sélectionné.

► Un message de confirmation s'ouvre :

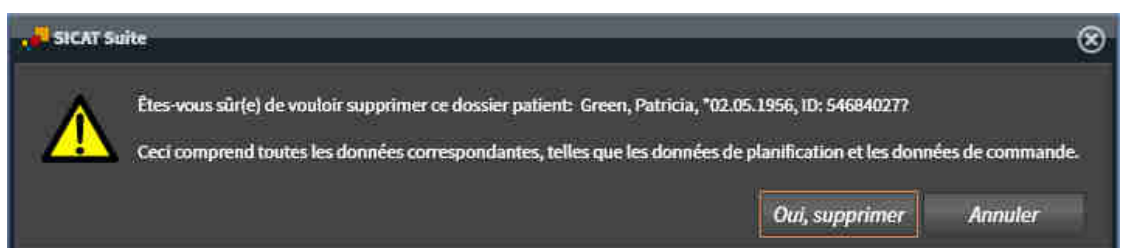

3. Si vous souhaitez supprimer les données sélectionnées, cliquez sur **Oui, supprimer** dans le dialogue de confirmation.
- SICAT Suite supprime du dépôt le dossier patient sélectionné ainsi que toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification qui y sont contenus et les retire de la liste **Dossiers patient**.

20.10 SUPPRIMER DES RADIOGRAPHIES 3D OU DES PROJETS DE PLANIFICATION DE DOSSIERS PATIENT



ATTENTION

Les dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Ne supprimez des dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin de ces données.




ATTENTION

Lorsque vous supprimez des radiographies 3D, tous les projets de planification qui en dépendent sont également supprimés.

Ne supprimez des radiographies 3D que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des projets de planification qui en dépendent.

Procédez de la manière suivante pour supprimer une radiographie 3D ou un projet de planification d'un dossier patient :

- La fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"* [► Page 72 - Standalone].

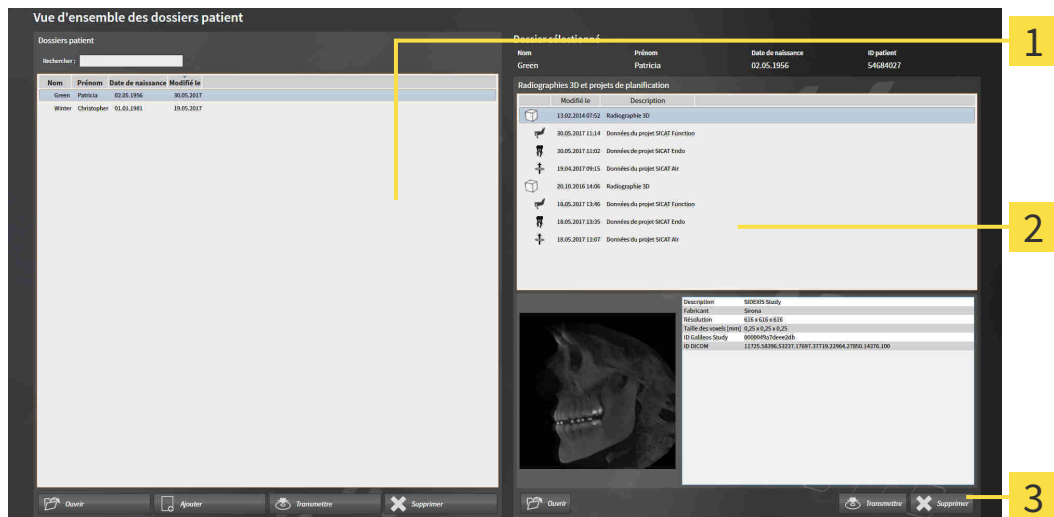

1 Liste **Dossiers patient**

2 Liste **Radiographies 3D et projets de planification**


3 Bouton **Supprimer**

1. Dans la fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient**, sélectionnez le dossier patient souhaité dans la liste **Dossiers patient**.
 - Dans la zone **Dossier sélectionné**, la liste **Radiographies 3D et projets de planification** affiche toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification du dossier patient sélectionné.
2. Sélectionnez dans la liste **Radiographies 3D et projets de planification** la radiographie 3D ou le projet de planification souhaité(e).



3. Cliquez sur le bouton **Supprimer**.

► Un message de confirmation s'ouvre :

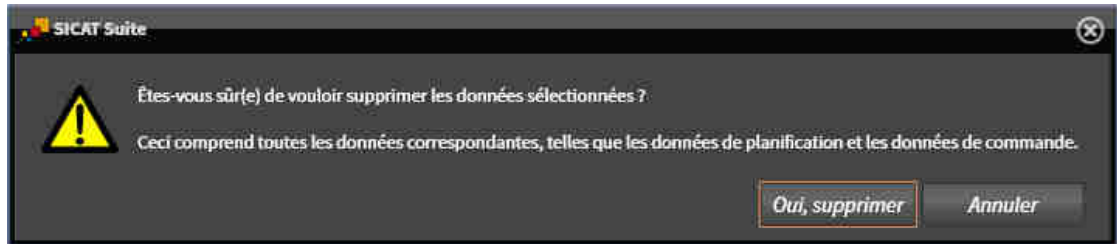

4. Si vous souhaitez supprimer les données sélectionnées, cliquez sur **Oui, supprimer** dans le dialogue de confirmation.


► SICAT Suite supprime la radiographie 3D ou le projet de planification sélectionné(e) du dossier patient et de la liste **Radiographies 3D et projets de planification**.



Vous pouvez également supprimer des radiographies 3D ou des projets de planification de dossiers patient dans la fenêtre **Dossier patient actif**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Travailler avec des dossiers patient actifs* [► Page 76 - Standalone].

21 INTERFACE UTILISATEUR DE SICAT FONCTION

L'interface utilisateur de SICAT Function se compose des éléments suivants :

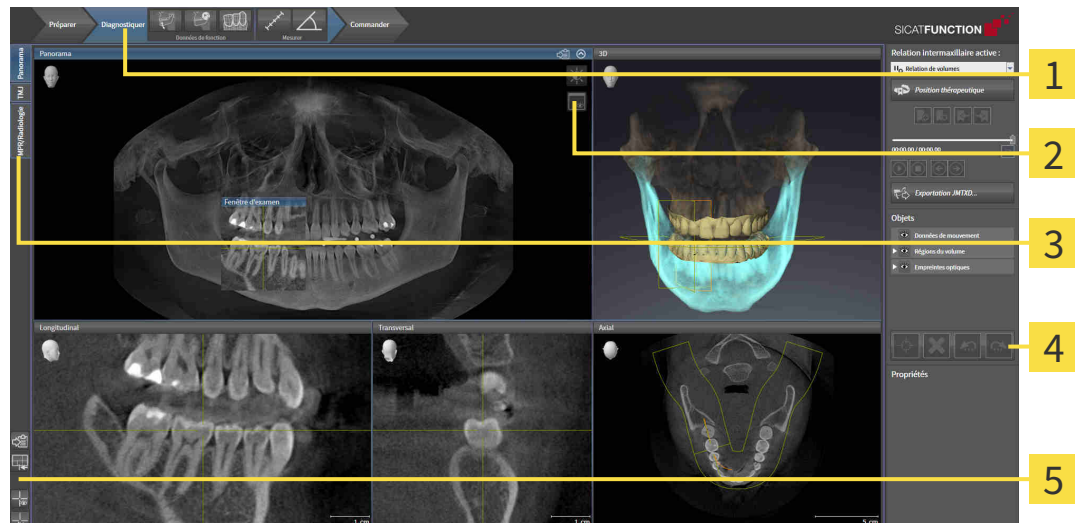

1 Barre d'outils de flux de travail

4 Barre d'objets

2 Barre d'outils de vue

5 Barre d'outils de l'espace de travail

3 Boutons de commutation entre les espaces de travail

- La **Barre d'outils de flux de travail** se compose des différentes étapes du flux de travail, qui contiennent les principaux outils du flux de travail de l'application. Il s'agit entre autres d'outils permettant d'ajouter et d'importer des objets de diagnostic et des objets de planification. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 90 - Standalone].
- La **Surface de l'espace de travail** est la partie de l'interface utilisateur située en dessous de la **Barre d'outils de flux de travail**. Elle affiche l'espace de travail actif de SICAT Function. Chaque espace de travail contient un ensemble défini de vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Espaces de travail* [► Page 98 - Standalone].
- Seule la vue active affiche la **Barre d'outils de vue**. Elle contient des outils permettant d'adapter la représentation de la vue correspondante. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation des vues* [► Page 108 - Standalone] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 121 - Standalone].
- La **Barre d'objets** comprend des outils servant à la gestion des objets de diagnostic et de planification. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'objets* [► Page 92 - Standalone].
- La **Barre d'outils de l'espace de travail** comprend des outils permettant de modifier les réglages généraux des espaces de travail et de toutes les vues qu'ils contiennent, et de documenter le contenu des espaces de travail. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [► Page 116 - Standalone], *Réinitialiser les vues* [► Page 119 - Standalone], *Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail* [► Page 105 - Standalone] et *Créer des captures d'écran d'espaces de travail* [► Page 106 - Standalone].

21.1 BARRE D'OUTILS DE FLUX DE TRAVAIL

Dans SICAT Function, la **Barre d'outils de flux de travail** est constituée de trois étapes de flux de travail :

1. **Préparer**
2. **Diagnostiquer**
3. **Commander**

RÉDUIRE OU DÉVELOPPER LES ÉTAPES DE FLUX DE TRAVAIL

Vous pouvez réduire ou développer les étapes de flux travail en cliquant dessus.

1. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « PRÉPARER »



Les outils suivants sont disponibles dans l'étape de flux de travail **Préparer** :




- **Adapter les niveaux de gris** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les niveaux de gris* [► Page 133 - Standalone]. Cet outil n'est disponible et nécessaire que pour des volumes d'appareils non Sirona.



- **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter l'orientation du volume* [► Page 137 - Standalone] et *Adapter la zone panoramique* [► Page 142 - Standalone].

2. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « DIAGNOSTIQUER »

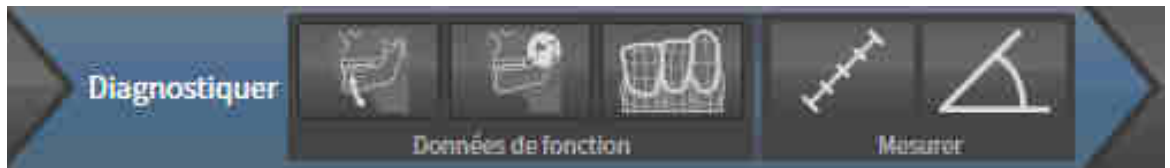

Les outils suivants sont disponibles dans l'étape de flux de travail **Diagnostiquer** :



- **Importer et recaler les données de mouvement de la mâchoire** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recaler des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 147 - Standalone].



- **Segmenter la mandibule et les condyles** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Segmentation* [► Page 152 - Standalone].



- **Importer et recaler les empreintes optiques** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recaler les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone].




- **Ajouter une mesure de distance (D)** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des mesures de distances* [► Page 191 - Standalone].



- **Ajouter une mesure d'angle (A)** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des mesures d'angles* [► Page 192 - Standalone].

3. ÉTAPE DE FLUX DE TRAVAIL « COMMANDER »

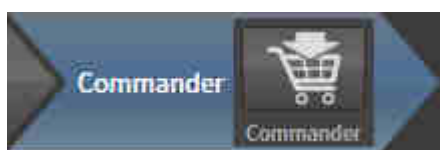

L'outil suivant est disponible dans l'étape de flux de travail **Commander** :



- **Commander la gouttière thérapeutique** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [► Page 203 - Standalone].

21.2 BARRE D'OBJETS



1 Navigateur d'objets

2 Bouton **Masquer la barre d'objets** ou bouton **Afficher la barre d'objets**

3 Barre d'outils d'objet

4 Zone **Propriétés**

La **Barre d'objets** comprend les éléments suivants :

- Le **Navigateur d'objets** affiche une liste classée par catégories de tous les objets de diagnostic et de planification que vous avez ajoutés ou importés à votre étude actuelle. Le **Navigateur d'objets** groupe les objets automatiquement. Le groupe **Mesures**, par exemple, contient tous les objets de mesure. Vous pouvez réduire ou développer les groupes d'objets, activer les objets et les groupes d'objets, et masquer et afficher les objets et les groupes d'objets. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone].
- La **Barre d'outils d'objet** comprend des outils permettant de focaliser des objets, de supprimer des objets ou des groupes d'objets et d'annuler ou de répéter des manipulations d'objets ou de groupes d'objets. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 95 - Standalone].
- La zone **Propriétés** affiche des détails sur l'objet actif.

Vous pouvez changer la visibilité de la **Barre d'objets** avec deux boutons sur le côté droit **Barre d'objets: Masquer la barre d'objets** et **Afficher la barre d'objets**

Les objets qui sont disponibles dans SICAT Fonction sont décrits dans le paragraphe *Objets de SICAT Fonction* [► Page 96 - Standalone].

21.3 GESTION DES OBJETS À L'AIDE DU NAVIGATEUR D'OBJETS

RÉDUIRE ET DÉVELOPPER LES GROUPES D'OBJETS

Procédez de la manière suivante pour réduire et développer un groupe d'objets :



Le groupe d'objets de votre choix est développé.



1. Cliquez à côté du groupe d'objets de votre choix sur l'icône **Réduire**.

▶ Le groupe d'objets est réduit.



2. Cliquez à côté du groupe d'objets de votre choix sur l'icône **Développer**.

▶ Le groupe d'objets est développé.

ACTIVER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS

Certains outils ne sont disponibles que pour les objets ou groupes d'objets actifs.

Procédez de la manière suivante pour activer un objet ou un groupe d'objets :

L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est actuellement désactivé.

- Cliquez sur l'objet ou le groupe d'objets de votre choix.
 - ▶ SICAT Function désactive un objet ou un groupe d'objets précédemment activé.
 - ▶ SICAT Function active l'objet ou le groupe d'objet de votre choix.
 - ▶ SICAT Function met l'objet ou le groupe d'objet en relief en couleur dans le **Navigateur d'objets** et dans les vues.



Vous pouvez également activer certains objets dans les vues 2D en cliquant sur ces objets.

MASQUER ET AFFICHER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS



Cette fonction n'est disponible que pour certains types d'objets.

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher un objet ou un groupe d'objets :

- L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est actuellement affiché.



1. Cliquez à côté de l'objet ou du groupe d'objets de votre choix, sur l'icône **Affiché** ou sur l'icône **Partiellement affiché**.



- ▶ SICAT Function masque l'objet ou le groupe d'objets.
- ▶ SICAT Function affiche l'icône **Masqué** à côté de l'objet ou du groupe d'objets.



2. Cliquez à côté de l'objet ou du groupe d'objets de votre choix, sur l'icône **Masqué**.

- ▶ SICAT Function affiche l'objet ou le groupe d'objets.
- ▶ SICAT Function affiche l'icône **Affiché** à côté de l'objet ou du groupe d'objets.

21.4 GESTION DES OBJETS À L'AIDE DE LA BARRE D'OUTILS D'OBJET



Ces fonctions ne sont disponibles que pour certains types d'objets.

FOCALISER LES OBJETS

Utilisez cette fonction afin de trouver les objets dans les vues.

Procédez de la manière suivante pour focaliser un objet :

- L'objet voulu est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone].



- Cliquez sur l'icône **Focaliser l'objet actif (F)**.
- ▶ SICAT Function déplace le point de focalisation des vues sur l'objet actif.
- ▶ SICAT Function affiche l'objet actif dans les vues.



Vous pouvez également focaliser des objets à l'aide d'un double-clic sur ces objets dans le **Navigateur d'objets** ou dans une vue, à l'exception de la vue **3D**.

SUPPRIMER LES OBJETS ET LES GROUPES D'OBJETS

Procédez de la manière suivante pour supprimer un objet ou un groupe d'objets :

- L'objet ou le groupe d'objets de votre choix est déjà activé. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone].



- Cliquez sur l'icône **Supprimer un objet actif/groupe actif (Suppr)**.
- ▶ SICAT Function supprime l'objet ou le groupe d'objets.

ANNULER ET RÉPÉTER LES MANIPULATIONS D'UN OBJET

Procédez de la manière suivante pour annuler et répéter les dernières manipulations d'un objet ou d'un groupe d'objets :



1. Cliquez sur l'icône **Annuler la dernière manipulation d'un objet/groupe (Ctrl+Z)**.
 - ▶ SICAT Function annule la dernière manipulation d'un objet ou d'un groupe.



2. Cliquez sur l'icône **Répéter la manipulation d'un objet/groupe (Ctrl+Y)**.
 - ▶ SICAT Function répète la dernière manipulation annulée d'un objet ou d'un groupe.



Les fonctions annuler et répéter les manipulations ne sont disponibles que tant qu'une étude est ouverte dans une application SICAT.

21.5 OBJETS DE SICAT FONCTION

Dans le **Navigateur d'objets**, SICAT Function groupe les objets spécifiques à une application selon les critères suivants :


- **Données de mouvement**
- **Régions du volume**
 - **Mandibule**
- **Empreintes optiques**

DONNÉES DE MOUVEMENTOBJET



Une fois que vous avez importé les données de mouvement de la mâchoire, SICAT Function affiche un objet **Données de mouvement** dans le **Navigateur d'objets**.

RÉGIONS DU VOLUMEOBJET ET MANDIBULE OBJET

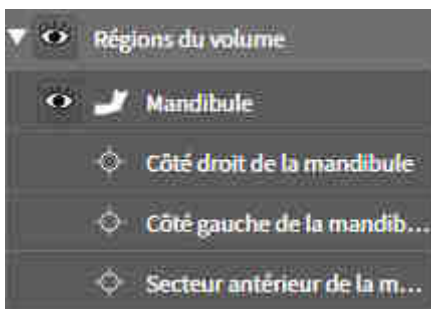


Une fois que vous avez segmenté la mâchoire inférieure, SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. L'objet **Régions du volume** contient l'objet **Mandibule**. L'objet **Mandibule** contient les sous-objets suivants :

- **Côté gauche de la mandibule**
- **Côté droit de la mandibule**
- **Secteur antérieur de la mandibule**

Si vous focalisez un des sous-objets, SICAT Function focalise l'objet sélectionné dans toutes les vues 2D.

OBJET EMPREINTES OPTIQUES

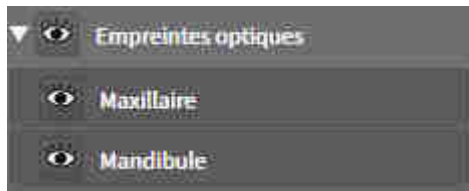

Une fois que vous avez importé et enregistré des empreintes optiques, SICAT Function affiche un objet **Empreintes optiques** dans le **Navigateur d'objets**. Un objet **Empreintes optiques** contient les sous-objets suivants :

- **Maxillaire**
- **Mandibule**

Si vous focalisez un des sous-objets, SICAT Function focalise l'objet sélectionné dans toutes les vues 2D.

Lorsque vous supprimez un objet **Maxillaire** ou un objet **Mandibule**, SICAT Function supprime toutes les empreintes optiques disponibles de l'étude.

22 ESPACES DE TRAVAIL

Les applications SICAT représentent des études dans différentes vues et disposent des ensembles de vues dans des espaces de travail.

SICAT Function dispose de trois espaces de travail différents :




- **Panorama**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail Panorama* [▶ Page 99 - Standalone].
- **TMJ**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 101 - Standalone].
- **MPR/Radiologie**Espace de travail - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail MPR/Radiologie* [▶ Page 103 - Standalone].

Les actions suivantes sont disponibles pour les espaces de travail et pour les vues qu'ils contiennent :

- *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 104 - Standalone].
- *Adapter et réinitialiser la présentation des espaces de travail* [▶ Page 105 - Standalone].
- *Adaptation des vues* [▶ Page 108 - Standalone].
- Il existe des possibilités supplémentaires pour adapter la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 121 - Standalone].
- Vous pouvez documenter le contenu d'un espace de travail actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Créer des captures d'écran d'espaces de travail* [▶ Page 106 - Standalone].

22.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL PANORAMA

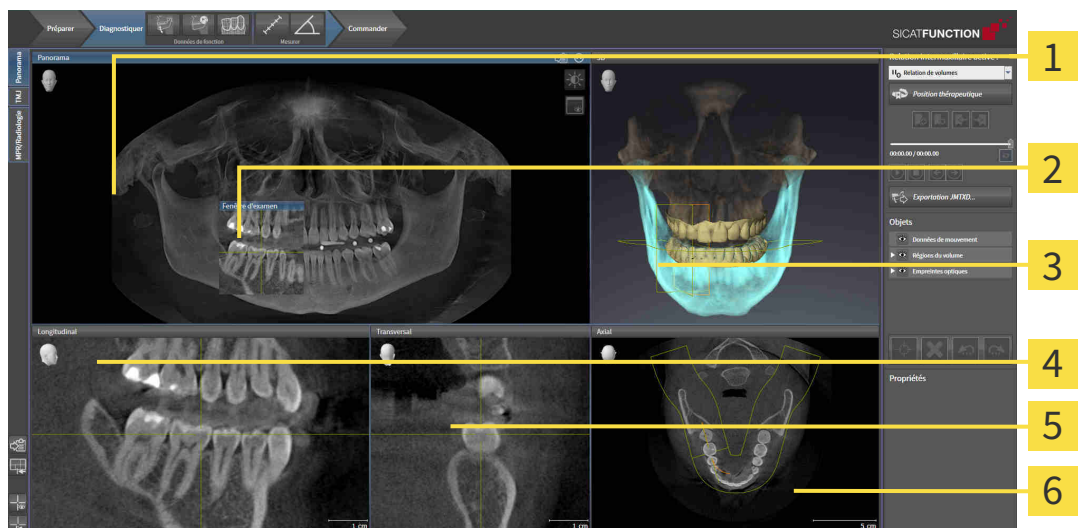

1 Panorama-Vue

2 Fenêtre d'examen

3 3D-Vue

4 Longitudinal-Vue

5 Transversal-Vue

6 Axial-Vue

VUE PANORAMA

La vue **Panorama** correspond à un orthopantomogramme (OPG) virtuel. Elle représente une projection orthogonale sur la courbe panoramique, avec une épaisseur définie. Vous pouvez adapter la courbe panoramique et l'épaisseur aux deux mâchoires. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Adapter la zone panoramique* [► Page 142 - Standalone].

FENÊTRE D'EXAMEN

La **Fenêtre d'examen** est incluse dans la vue **Panorama**. Elle apporte la troisième dimension à la vue **Panorama** en visualisant des coupes parallèles à la courbe panoramique. Vous pouvez masquer et afficher la **Fenêtre d'examen**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 117 - Standalone].

VUE 3D

La vue **3D** visualise une représentation 3D de l'étude ouverte.

VUE LONGITUDINAL

La vue **Longitudinal** représente des coupes qui sont tangentielles à la courbe panoramique.

VUE TRANSVERSAL


La vue **Transversal** représente des coupes qui sont orthogonales à la courbe panoramique.

VUE AXIAL

Par défaut, la vue **Axial** représente des coupes vues du dessus. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Axial**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [▶ Page 223 - Standalone].

Vous trouverez les fonctions des vues sous *Adaptation des vues* [▶ Page 108 - Standalone] et *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 121 - Standalone].

22.2 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL TMJ

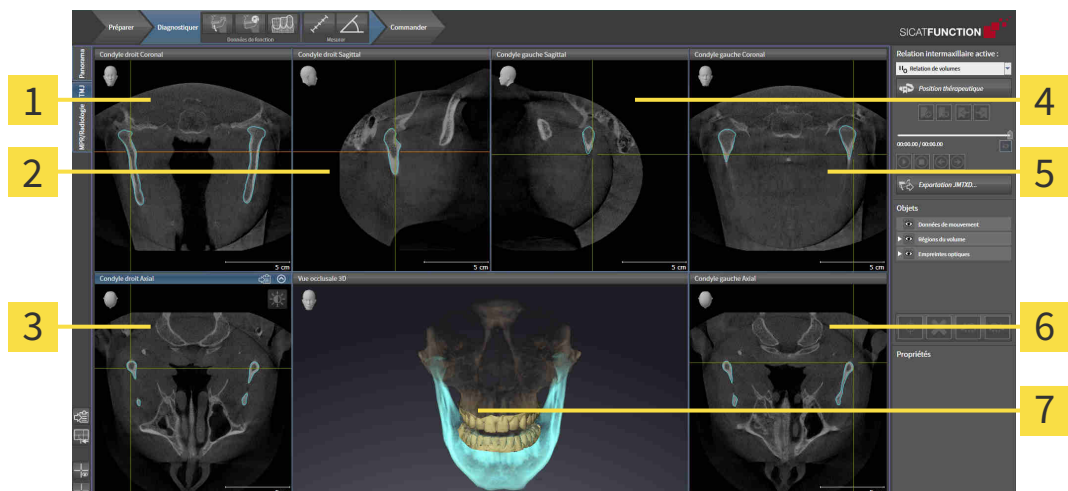

1 Condyle droit Coronal-Vue

5 Condyle gauche Coronal-Vue

2 Condyle droit Sagittal-Vue

6 Condyle gauche Axial-Vue

3 Condyle droit Axial-Vue


7 Vue occlusale 3D

4 Condyle gauche Sagittal-Vue

Vous pouvez sélectionner les articulations anatomiques individuelles d'un patient dans la zone JMT et les examiner dans les vues. Vous trouverez des informations sur la zone JMT dans *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].

L'espace de travail **TMJ** visualise simultanément le condyle gauche et le condyle droit. Ceci permet une comparaison directe entre les deux articulations temporo-mandibulaires. La comparaison permet d'identifier des dissymétries de mouvement et de morphologie au niveau des articulations temporo-mandibulaires.

SICAT Function Les condyles en mouvement sont repérés différemment dans :

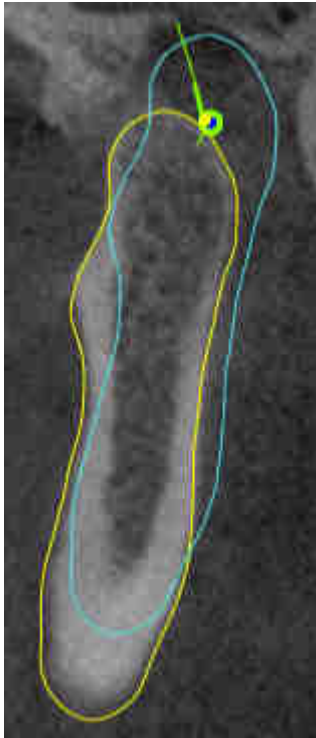


- Les condyles en mouvement dans les vues de coupe sont représentés dans SICAT Function avec un contour bleu.
- La limite de la segmentation dans les vues de coupe est représentée dans SICAT Function par un contour jaune.
- Les condyles en mouvement dans la vue de coupe **3D** sont représentés dans SICAT Function sous forme d'un objet 3D.

Pour faciliter la comparaison de l'ATM droite et de l'ATM gauche, les vues doivent être orientées par rapport au plan médian sagittal (plan de symétrie miroir) de la tête. Pour compenser des erreurs de positionnement pendant la radiographie 3D, utilisez la fonction **Adapter l'orientation du volume**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter l'orientation du volume* [▶ Page 137 - Standalone]. Assurez-vous lors de l'orientation du volume, que les articulations temporo-mandibulaires soient le plus symétriques possibles par rapport au plan médian sagittal.

L'espace de travail **TMJ** offre des options supplémentaires pour l'analyse des données de mouvement de la mâchoire et des régions du volume. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 175 - Standalone], *Utilisation du triangle de Bonwill* [▶ Page 178 - Standalone], *Afficher la limite de la segmentation* [▶ Page 179 - Standalone] et *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [▶ Page 180 - Standalone].

22.3 VUE D'ENSEMBLE DE L'ESPACE DE TRAVAIL MPR/ RADIOLOGIE

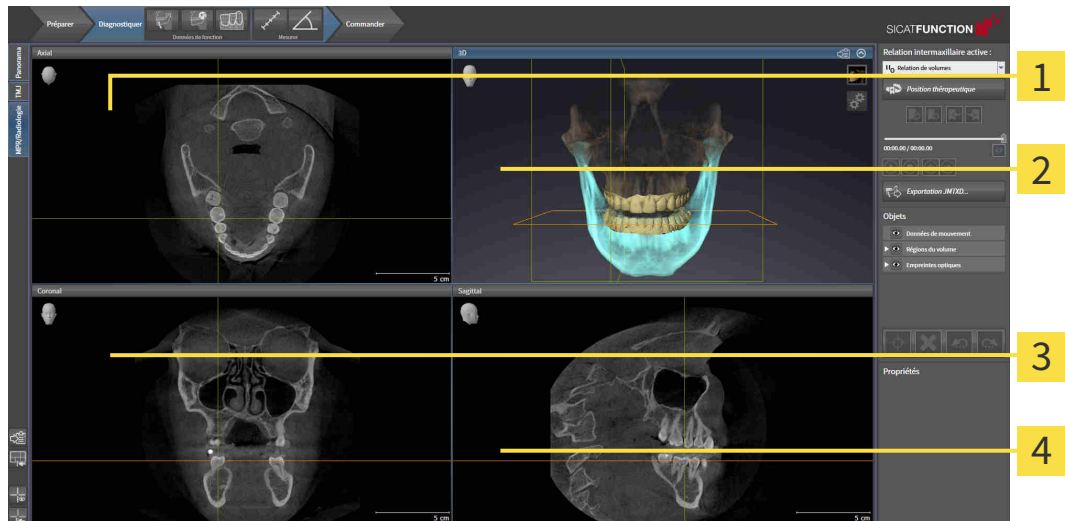

1 Axial-Vue

2 3D-Vue

3 Coronal-Vue

4 Sagittal-Vue

VUE AXIAL

Par défaut, la vue **Axial** représente des coupes vues du dessus. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Axial**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 223 - Standalone].

VUE 3D

La vue **3D** visualise une représentation 3D de l'étude ouverte.

VUE CORONAL

La vue **Coronal** représente des coupes vues de devant.

VUE SAGITTAL

Par défaut, la vue **Sagittal** représente des coupes vues de la droite. Vous pouvez commuter le sens de vision de la vue **Sagittal**. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 223 - Standalone].

Vous trouverez les fonctions des vues sous *Adaptation des vues* [► Page 108 - Standalone] et *Adaptation de la vue 3D* [► Page 121 - Standalone].

22.4 CHANGER D'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour changer d'espace de travail actif :



- Cliquez dans le coin supérieur gauche de la surface de l'espace de travail sur l'onglet de l'espace de travail désiré.
- ▶ L'espace de travail sélectionné s'ouvre.


22.5 ADAPTER ET RÉINITIALISER LA PRÉSENTATION DES ESPACES DE TRAVAIL

ADAPTER LA PRÉSENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour adapter la présentation de l'espace de travail actif :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la frontière entre deux ou plusieurs vues.

► Le pointeur de la souris change de forme :

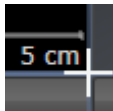

2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez le bouton enfoncé.

3. Déplacez la souris.

► La position de la frontière est modifiée.

► La taille de toutes les vues limitrophes est modifiée.

4. Relâchez le bouton gauche de la souris.

► SICAT Function conserve la position actuelle de la frontière et les tailles de toutes les vues limitrophes.

RÉINITIALISER LA PRÉSENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL ACTIF

Procédez de la manière suivante pour réinitialiser la présentation de l'espace de travail actif :



- Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Réinitialiser la présentation de l'espace de travail actif**.

► SICAT Function restaure l'espace de travail actif à sa présentation standard. Autrement dit, le logiciel affiche toutes les vues dans leur taille par défaut.

22.6 CRÉER DES CAPTURES D'ÉCRAN D'ESPACES DE TRAVAIL

Vous pouvez copier des captures d'écran des espaces de travail dans le presse-papiers de Windows, à des fins de documentation.

COPIER UNE CAPTURE D'ÉCRAN D'UN ESPACE DE TRAVAIL DANS LE PRESSE-PAPIERS DE WINDOWS

Procédez de la manière suivante pour copier une capture d'écran de l'espace de travail dans le presse-papiers de Windows :

- ☑ L'espace de travail souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [▶ Page 104 - Standalone].



- Cliquez dans la barre d'outils de l'espace de travail sur l'icône **Copier la copie d'écran de l'espace de travail actif dans le presse-papier**.
- ▶ SICAT Function copie une capture d'écran de l'espace de travail dans le presse-papiers de Windows.



Vous pouvez coller des captures d'écran du presse-papiers dans de nombreuses applications, par exemple des logiciels de traitement d'image et de traitement de texte. Dans la plupart des applications, le raccourci clavier Ctrl+V est utilisé pour la fonction coller.

23 VUES


Les vues sont contenues dans les espaces de travail. Vous trouverez une description des différents espaces de travail et des vues dans le paragraphe *Espaces de travail* [▶Page 98 - Standalone].

Vous pouvez adapter les vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation des vues* [▶Page 108 - Standalone] et *Adaptation de la vue 3D* [▶Page 121 - Standalone].

23.1 ADAPTATION DES VUES

Certains outils d'adaptation des vues ne sont disponibles que dans la vue active. L'activation d'une vue est décrite dans le paragraphe *Changer de vue active* [► Page 110 - Standalone].

Une vue active contient les éléments suivants :

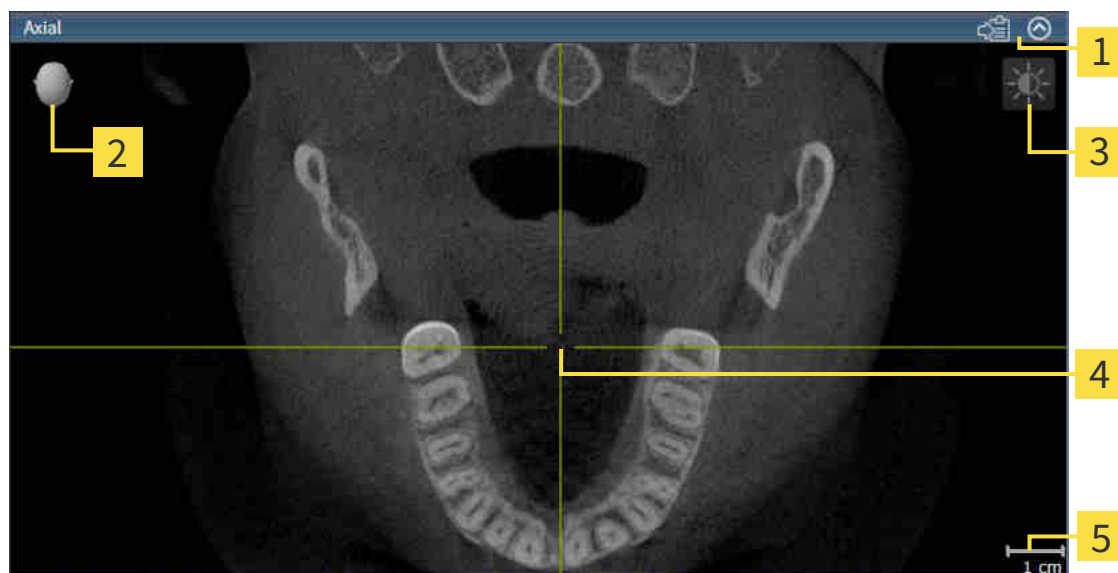

- 1** Barre de titre
- 2** Tête d'orientation
- 3** Barre d'outils de vue
- 4** Réticule
- 5** Échelle

Les vues de coupes 2D affichent des réticules. Les réticules sont des lignes d'intersection avec d'autres vues de coupes. SICAT Function synchronise toutes les vues de coupe entre elles. Autrement dit, tous les réticules indiquent la même position au sein des données de radiographie 3D. Ceci vous permet de corréler les structures anatomiques entre toutes les vues.

La vue **3D** affiche des cadres qui représentent la position actuelle des vues de coupes 2D.

Les actions suivantes sont disponibles pour adapter les vues :

- *Changer de vue active* [▶ Page 110 - Standalone]
- *Maximiser et restaurer les vues* [▶ Page 111 - Standalone]
- *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 112 - Standalone]
- *Zoomer les vues et déplacer des extraits* [▶ Page 114 - Standalone]
- *Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D* [▶ Page 115 - Standalone]
- *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 116 - Standalone]
- *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [▶ Page 117 - Standalone]
- *Réinitialiser les vues* [▶ Page 119 - Standalone]

Il existe des possibilités supplémentaires pour adapter la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 121 - Standalone].


Vous pouvez documenter le contenu d'une vue active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Créer des captures d'écran de vues* [▶ Page 120 - Standalone].

23.2 CHANGER DE VUE ACTIVE

Seule la vue active affiche la **Barre d'outils de vue** et la barre de titre.


Procédez de la manière suivante pour activer une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix :

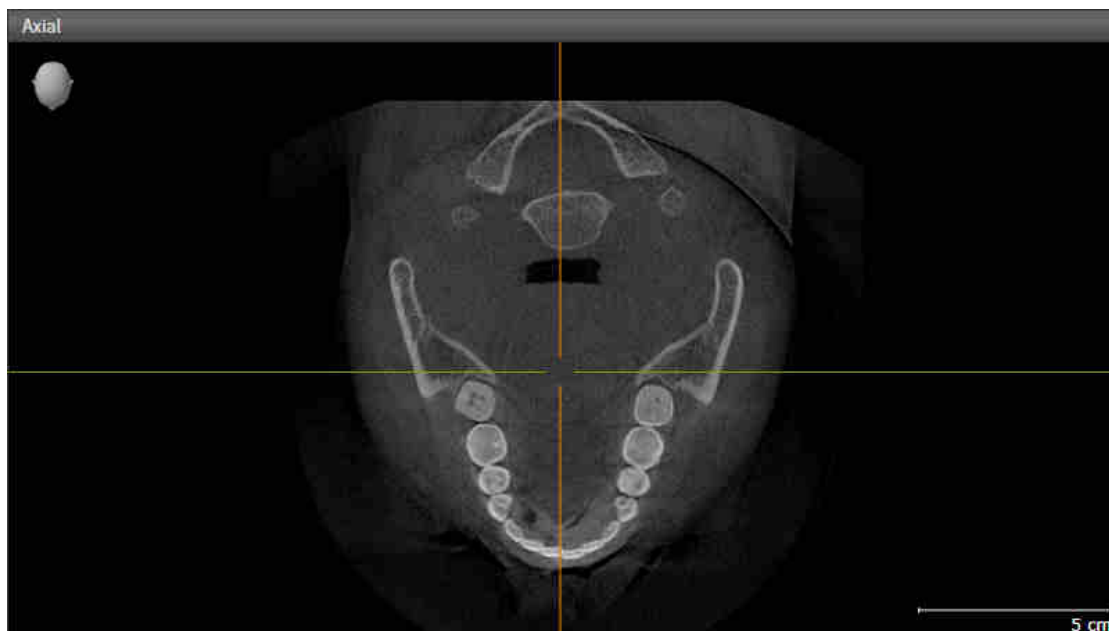

2. Cliquez dans la vue souhaitée.

► SICAT Function active la vue :

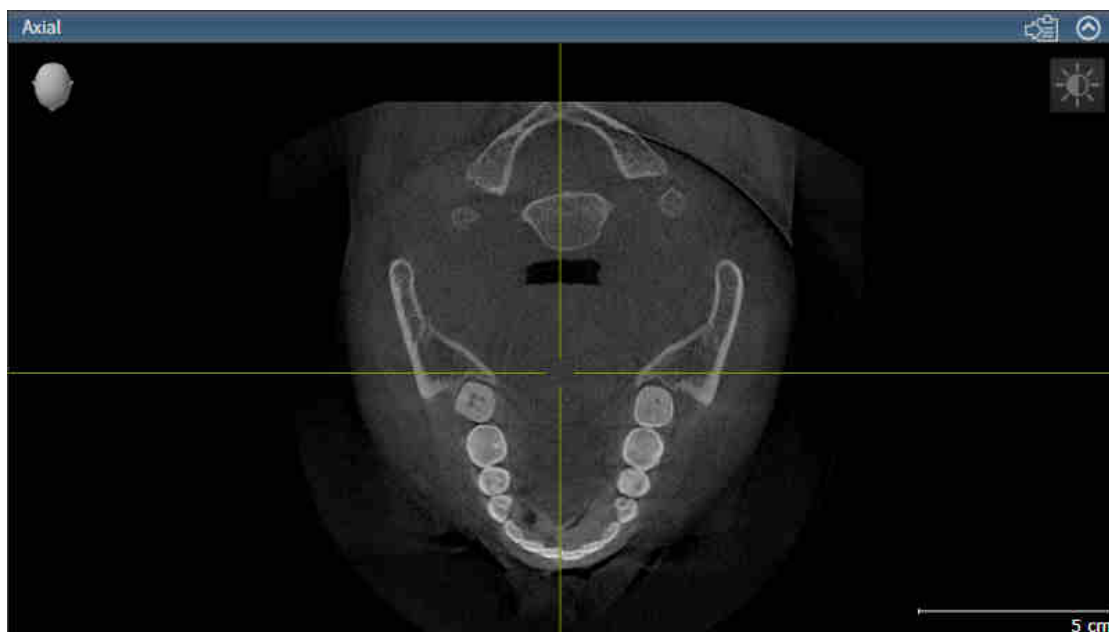

La vue activée est reconnaissable à la couleur orange de la barre de titre.

23.3 MAXIMISER ET RESTAURER LES VUES

Procédez de la manière suivante pour maximiser une vue et la restaurer à sa taille précédente :

- ☑ La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 110 - Standalone].
- ☑ La vue de votre choix n'est pas maximisée.



1. Dans la barre de titre de la vue concernée, cliquez sur l'icône **Maximiser**.
 - ▶ SICAT Function maximise la vue.



2. Dans la barre de titre de la vue maximisée, cliquez sur l'icône **Restaurer**.
 - ▶ SICAT Function restaure la vue à sa taille précédente.



Les possibilités suivantes sont également disponibles pour maximiser des vues et les restaurer à leur taille précédente :

- Pour maximiser une vue, vous pouvez également double-cliquer sur la barre de titre de la vue concernée.
- Pour restaurer une vue à sa taille précédente, vous pouvez également double-cliquer sur la barre de titre de la vue maximisée.

23.4 ADAPTER ET RESTAURER LE CONTRASTE ET LA LUMINOSITÉ DES VUES 2D

Procédez de la manière suivante pour adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D :

- ☑ La vue 2D de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 110 - Standalone].



1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue 2D sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**.

► La fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité** s'ouvre :



2. Amenez le pointeur de la souris sur le curseur **Luminosité**.
3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas.

► SICAT Function adapte la luminosité de la vue 2D en fonction de la position du curseur **Luminosité**.

4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
- SICAT Function conserve la luminosité actuelle de la vue 2D.



5. Amenez le pointeur de la souris sur le curseur **Contraste**.
6. Cliquez avec le bouton gauche de la souris en maintenant le bouton enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas.

► SICAT Function adapte le contraste de la vue 2D en fonction de la position du curseur **Contraste**.

7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
- SICAT Function conserve le contraste actuel de la vue 2D.

8. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité**.

► La fenêtre transparente **Adapter le contraste et la luminosité** se ferme.

Pour restaurer les valeurs de contraste et de luminosité par défaut de la vue 2D, vous pouvez cliquer sur l'icône **Réinitialiser la luminosité et le contraste**.



Les réglages de contraste et de luminosité de toutes les vues de coupes 2D sont couplés.

23.5 ZOOMER LES VUES ET DÉPLACER DES EXTRAITS

ZOOMER UNE VUE

La fonction de zoom agrandit ou réduit le contenu d'une vue.

Procédez de la manière suivante pour zoomer une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix.
2. Tournez la molette de la souris vers l'avant.
 - ▶ La vue est agrandie (zoom avant).
3. Tournez la molette de la souris vers l'arrière.
 - ▶ La vue est réduite (zoom arrière).



Une autre solution consiste à cliquer sur le bouton médian de la souris et à déplacer la souris vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

DÉPLACER L'EXTRAIT D'UNE VUE

Procédez de la manière suivante pour déplacer l'extrait d'une vue :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton droit de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :
3. Déplacez la souris.
 - ▶ L'extrait de la vue se déplace en fonction du déplacement du pointeur de la souris.
4. Relâchez le bouton droit de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve l'extrait actuel de la vue.

23.6 NAVIGUER DANS LES COUPES DES VUES DE COUPES 2D

Procédez de la manière suivante pour naviguer dans les coupes dans une vue de coupes 2D :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une flèche bidirectionnelle.
3. Déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.
 - ▶ À l'exception de la coupe **Transversal**, les coupes se déplacent parallèlement.
 - ▶ La coupe **Transversal** se déplace le long de la courbe panoramique.
 - ▶ SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.
 - ▶ SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la coupe actuelle.

23.7 DÉPLACER, MASQUER ET AFFICHER LES RÉTICULES ET LES CADRES

DÉPLACER UN RÉTICULE

Procédez de la manière suivante pour déplacer le réticule dans une vue de coupe 2D :

Tous les réticules et tous les cadres sont affichés.

1. Amenez le pointeur de la souris dans la vue de votre choix, sur le centre du réticule.

▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un réticule :



2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.

3. Déplacez la souris.

▶ Le réticule de la vue suit le déplacement de la souris.

▶ SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.

▶ SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.

4. Relâchez le bouton gauche de la souris.

▶ SICAT Function conserve la position actuelle du réticule.



Pour déplacer directement le réticule à la position du pointeur de la souris, vous pouvez également double-cliquer dans une vue 2D.

MASQUER ET AFFICHER LES RÉTICULES ET LES CADRES

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher tous les réticules et tous les cadres :

Tous les réticules et tous les cadres sont affichés.



1. Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Masquer les réticules et les cadres**.

▶ SICAT Function masque les réticules dans toutes les vues de coupes 2D.

▶ SICAT Function masque les cadres dans la vue **3D**.



2. Cliquez sur l'icône **Afficher les réticules et les cadres**.

▶ SICAT Function affiche les réticules dans toutes les vues de coupes 2D.

▶ SICAT Function affiche les cadres dans la vue **3D**.

23.8 DÉPLACER, MASQUER ET AFFICHER LA FENÊTRE D'EXAMEN

DÉPLACER LA FENÊTRE D'EXAMEN

Procédez de la manière suivante pour déplacer la **Fenêtre d'examen** :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 104 - Standalone].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée :



1. Dans la vue **Panorama**, amenez le pointeur de la souris sur la barre de titre de la **Fenêtre d'examen**.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une main.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Déplacez la souris.
 - La **Fenêtre d'examen** suit le déplacement de la souris.
 - SICAT Function adapte les coupes et les réticules des autres vues en fonction du point de focalisation actuel.
 - SICAT Function adapte les cadres dans la vue **3D** en fonction du point de focalisation actuel.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle de la **Fenêtre d'examen**.

MASQUER ET AFFICHER LA FENÊTRE D'EXAMEN



L'icône indiquant si la **Fenêtre d'examen** est affichée ou masquée sert à la fois d'indicateur d'état et de commutateur.

Procédez de la manière suivante pour masquer et afficher la **Fenêtre d'examen** :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 104 - Standalone].
- ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée.



1. Dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **Panorama**, cliquez sur l'icône **Masquer la fenêtre d'examen**.

► SICAT Function masque la **Fenêtre d'examen**.



2. Dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **Panorama**, cliquez sur l'icône **Afficher la fenêtre d'examen**.

► SICAT Function affiche la **Fenêtre d'examen**.

23.9 RÉINITIALISER LES VUES

Procédez de la manière suivante pour réinitialiser toutes les vues :



- Cliquez dans la **Barre d'outils de l'espace de travail** sur l'icône **Réinitialiser les vues**.
- ▶ SICAT Function restaure toutes les vues à leurs valeurs par défaut en ce qui concerne le zoom, le déplacement des extraits, la navigation, le déplacement des réticules et le déplacement de la **Fenêtre d'examen**.
- ▶ SICAT Function réinitialise le sens de vision de la vue **3D** à sa valeur par défaut.

23.10 CRÉER DES CAPTURES D'ÉCRAN DE VUES

Vous pouvez créer des captures d'écran des vues à des fins de documentation, et les éditer de différentes manières :

- en les copiant dans le presse-papiers de Windows.

COPIER LA CAPTURE D'ÉCRAN D'UNE VUE DANS LE PRESSE-PAPIERS DE WINDOWS

Procédez de la manière suivante pour copier une capture d'écran d'une vue dans le presse-papiers de Windows :

- La vue de votre choix est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ *Page 110 - Standalone*].



- Dans la barre de titre de la vue, cliquez sur l'icône **Copier la capture d'écran dans le presse-papiers (Ctrl+C)**.
- ▶ SICAT Function copie une capture d'écran de la vue dans le presse-papiers de Windows.



Vous pouvez coller des captures d'écran du presse-papiers dans de nombreuses applications, par exemple des logiciels de traitement d'image et de traitement de texte. Dans la plupart des applications, le raccourci clavier Ctrl+V est utilisé pour la fonction coller.

24 ADAPTATION DE LA VUE 3D

Vous pouvez modifier à tout moment le sens de vision de la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier le sens de vision de la vue 3D* [▶ Page 122 - Standalone].

Les actions suivantes sont disponibles pour configurer la vue **3D** :

- *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [▶ Page 126 - Standalone]
- *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [▶ Page 127 - Standalone]
- *Déplacer l'extrait* [▶ Page 129 - Standalone]

24.1 MODIFIER LE SENS DE VISION DE LA VUE 3D

Vous disposez de deux possibilités pour modifier le sens de vision de la vue **3D** :

- Modification interactive
- Sélection du sens de vision par défaut

MODIFIER LE SENS DE VISION DE LA VUE 3D DE MANIÈRE INTERACTIVE

Procédez de la manière suivante pour modifier de manière interactive le sens de vision de la vue **3D** :

1. Amenez le pointeur de la souris sur la vue **3D**.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une main.
3. Déplacez la souris.
 - ▶ Le sens de vision change en fonction du déplacement de la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve le sens de vision actuel de la vue **3D**.

SÉLECTION DU SENS DE VISION PAR DÉFAUT

Procédez de la manière suivante pour sélectionner un sens de vision par défaut dans la vue **3D** :



1. Amenez le pointeur de la souris dans le coin supérieur gauche de la vue **3D** sur l'icône Tête d'orientation.
 - ▶ La fenêtre transparente **Sens de vision** s'ouvre :



- ▶ Au centre de la fenêtre transparente **Sens de vision**, la Tête d'orientation mise en relief indique le sens de vision actuel.
2. Cliquez sur l'icône de Tête d'orientation représentant le sens de vision par défaut désiré.
 - ▶ Le sens de vision de la vue **3D** change en fonction de votre choix.
3. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Sens de vision**.
 - ▶ La fenêtre transparente **Sens de vision** se ferme.

24.2 TYPES DE REPRÉSENTATION DE LA VUE 3D

Vous trouverez des informations générales sur la vue **3D** dans *Adaptation de la vue 3D* [[▶ Page 121 - Standalone](#)].

SICAT Function offre deux types de représentation différentes pour la vue **3D** :



- Le type de représentation **Vue d'ensemble** visualise l'ensemble de la radiographie 3D.





- Le type de représentation **Extrait** visualise uniquement un extrait de la radiographie 3D. Cet extrait peut être déplacé.



Pour activer un type de représentation de la vue **3D**, reportez-vous à *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 126 - Standalone].

La configuration du type de représentation actif est décrite sous *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [► Page 127 - Standalone].

24.3 COMMUTER LE TYPE DE REPRÉSENTATION DE LA VUE 3D



Tous les types de représentation sont disponibles dans tous les espaces de travail.

Procédez de la manière suivante pour commuter le type de représentation de la vue **3D** :

La vue **3D** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [[Page 110 - Standalone](#)].

1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **3D** sur l'icône **Commuter le type de représentation**.

► La fenêtre transparente **Commuter le type de représentation** s'ouvre :



2. Cliquez sur l'icône du type de représentation souhaité.

► SICAT Function active le type de représentation désiré.

3. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Commuter le type de représentation**.

► La fenêtre transparente **Commuter le type de représentation** se ferme.

24.4 CONFIGURER LE TYPE DE REPRÉSENTATION ACTIF DE LA VUE 3D



Seuls les types de représentation configurables affichent l'icône **Configurer le type de représentation actif**. La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** visualise uniquement les réglages qui s'appliquent au type de représentation actif.

Procédez de la manière suivante pour configurer le type de représentation actif de la vue **3D** :

- La vue **3D** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 110 - Standalone].
- Le type de représentation souhaité est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [► Page 126 - Standalone].
- Le type de représentation actif est configurable.



1. Amenez le pointeur de la souris dans la **Barre d'outils de vue** de la vue **3D** sur l'icône **Configurer le type de représentation actif**.

► La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** s'ouvre :



2. Déplacez les curseurs de votre choix.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de la position des curseurs.
3. S'il est disponible, cliquez sur le symbole de la flèche à côté de **Réglages avancés**.
 - La zone **Réglages avancés** est développée.
4. Cochez ou décochez les cases disponibles.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de l'état des cases à cocher.
5. Déplacez les curseurs de votre choix.
 - SICAT Function adapte la vue **3D** en fonction de la position des curseurs.
6. Amenez le pointeur de la souris à l'extérieur de la fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif**.
 - La fenêtre transparente **Configurer le type de représentation actif** se ferme.



Vous pouvez réinitialiser les réglages aux valeurs par défaut en cliquant sur le bouton **Réinitialiser la configuration du type de représentation actif au réglage par défaut.**



Pour enregistrer les réglages actuels en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer la configuration du type de représentation actif comme réglage par défaut.**



S'il est disponible, déplacez le curseur **Vitesse de représentation** vers la gauche dans le cas d'ordinateurs lents.

24.5 DÉPLACER L'EXTRAIT

Vous trouverez des informations générales sur la vue **3D** dans *Adaptation de la vue 3D* [▶ Page 121 - Standalone].

Le type de représentation **Extrait** vous permet de masquer des parties du volume dans la vue **3D**. SICAT Function ne représente alors qu'une tranche extraite du volume, dont la position dans SICAT Function est synchronisée avec le réticule. Procédez de la manière suivante pour déplacer la tranche extraite du volume :

- Vous avez déjà activé le type de représentation **Extrait**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [▶ Page 126 - Standalone].



- Naviguez dans la vue **Axial**, **Coronal** ou **Sagittal** jusqu'à la coupe souhaitée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Naviguer dans les coupes des vues de coupes 2D* [► Page 115 - Standalone].
- ▶ SICAT Function déplace l'extrait en fonction de la coupe sélectionnée :




25 NIVEAUX DE GRIS



Vous ne pouvez adapter les niveaux de gris que pour des volumes qui ont été réalisés avec des appareils de radiographie 3D non Sirona.

Si la représentation du volume n'est pas satisfaisante, vous pouvez adapter les niveaux de gris du volume dans la fenêtre **Adapter les niveaux de gris** :

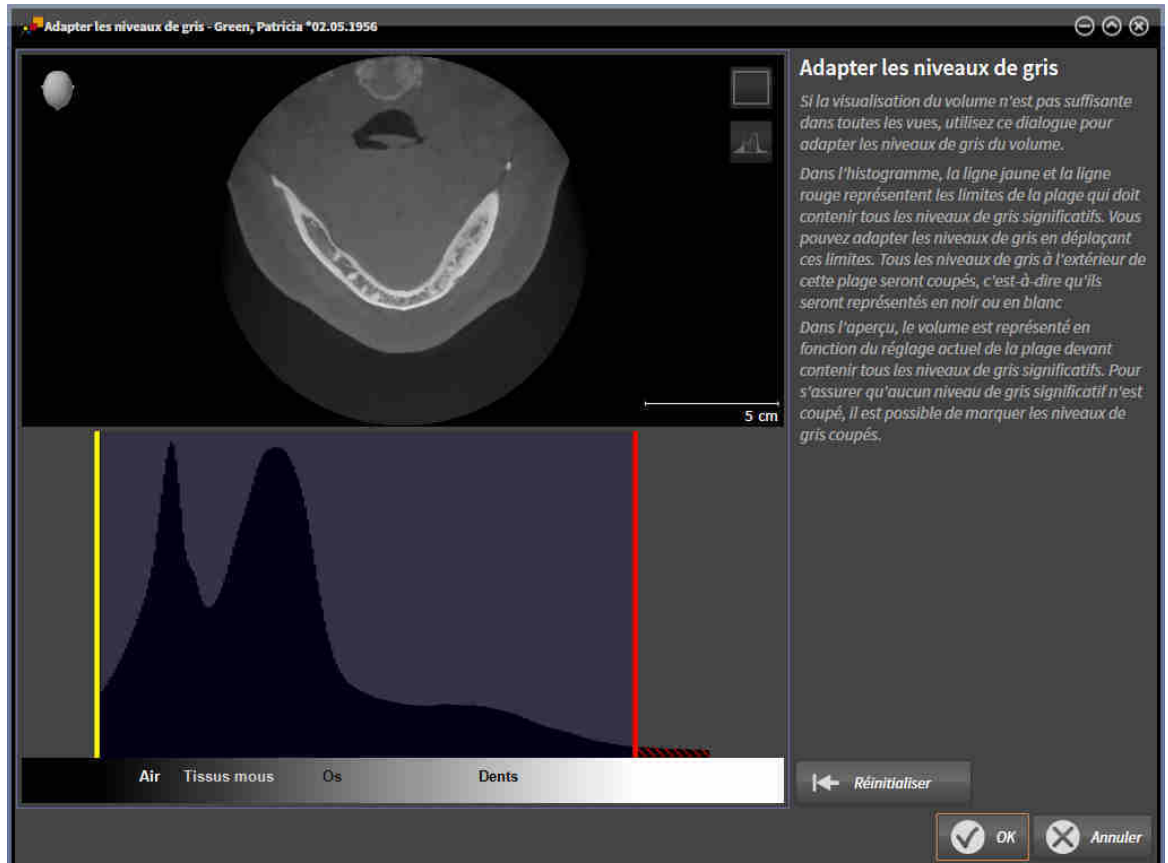

La fenêtre **Adapter les niveaux de gris** se compose de deux parties :

- La partie supérieure affiche une vue de coupe **Axial** ou une vue de projection **Coronal**.
- La partie inférieure affiche un histogramme représentant la distribution en fréquence des niveaux de gris.

Dans l'histogramme, la ligne jaune et la ligne rouge représentent les limites de la plage qui doit contenir tous les niveaux de gris significatifs. Vous pouvez adapter les niveaux de gris en déplaçant ces limites. SICAT Function coupe tous les niveaux de gris en dehors de l'espace. Autrement dit, le logiciel représente ces niveaux de gris en noir ou en blanc.

SICAT Function représente le volume dans la vue de coupe **Axial** ou dans la vue de projection **Coronal** en fonction de la plage qui doit contenir tous les niveaux de gris significatifs. Pour s'assurer que SICAT Function ne cache aucune information d'image significative, le logiciel peut marquer les niveaux de gris coupés.

Dans la vue de coupe **Axial**, vous pouvez naviguer à travers les coupes et les contrôler individuellement par rapport à des niveaux de gris coupés.

Dans la vue de projection **Coronal**, vous pouvez contrôler toutes les coupes à la fois par rapport à des niveaux de gris coupés.

N'adaptez les niveaux de gris que si la représentation du volume est insatisfaisante dans toutes les vues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les niveaux de gris* [▶ Page 133 - Standalone].

Pour mettre en relief certaines structures anatomiques, par exemple, vous pouvez modifier temporairement la luminosité et le contraste des vues 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 112 - Standalone].

Vous pouvez également adapter la représentation de la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Commuter le type de représentation de la vue 3D* [▶ Page 126 - Standalone], *Configurer le type de représentation actif de la vue 3D* [▶ Page 127 - Standalone] et *Commuter le mode d'extrait de la vue 3D*.

25.1 ADAPTER LES NIVEAUX DE GRIS

Vous trouverez des informations générales sur les niveaux de gris dans *Niveaux de gris* [► Page 131 - Standalone].


Procédez de la manière suivante pour adapter les niveaux de gris du volume :

- ☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



1. Cliquez sur l'icône **Adapter les niveaux de gris**.

► La fenêtre **Adapter les niveaux de gris** s'ouvre :

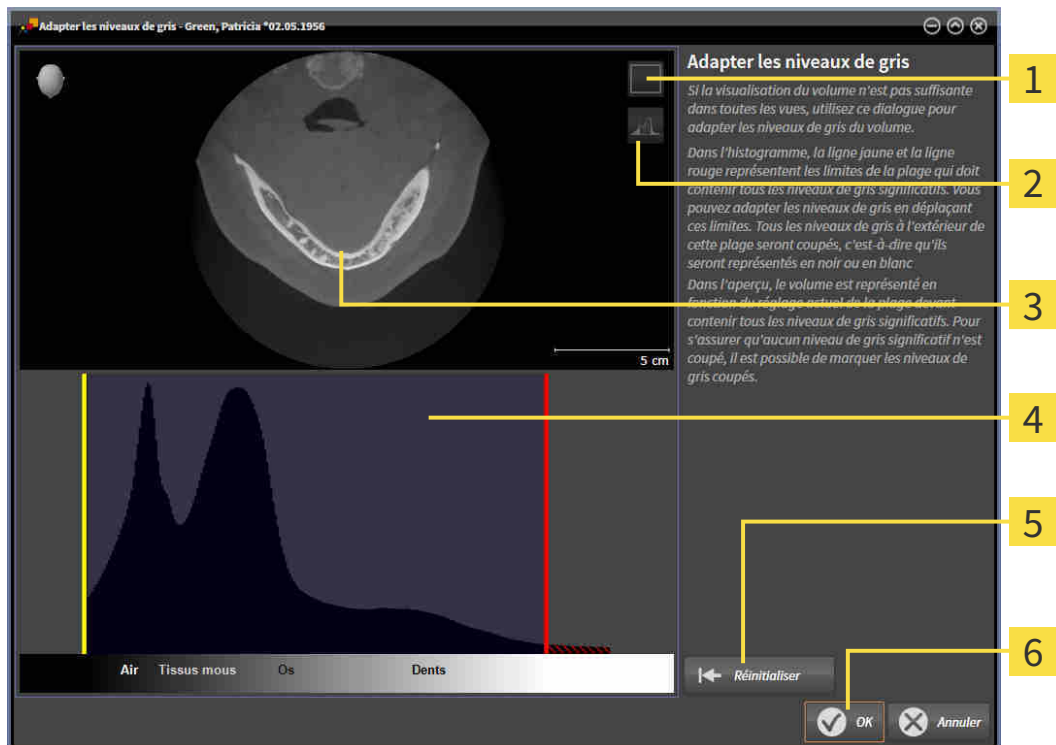

1 Symbole **Activer le mode projection coronale** ou symbole **Activer le mode coupes axiales**

2 Symbole **Ne pas marquer les niveaux de gris coupés** ou symbole **Marquer les niveaux de gris coupés**

3 **Axial** Vue de coupe ou vue de projection **Coronal**.

4 Histogramme

5 Bouton **Réinitialiser**

6 Bouton **OK**

2. Assurez-vous que le mode coupes axiales est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes axiales**.
3. Pour adapter la limite inférieure de la plage qui doit contenir tous les niveaux de gris significatifs, déplacez la ligne jaune.
 - SICAT Function adapte tous les niveaux de gris en conséquence dans la vue de coupe **Axial**.

- ▶ SICAT Function marque en jaune tous les niveaux de gris inférieurs au niveau de gris significatif le plus bas.
- 4. Naviguez dans les coupes axiales. Assurez-vous qu'aucun niveau de gris significatif n'est marqué en jaune. Si nécessaire, déplacez encore une fois la ligne jaune.
- 5. Pour adapter la limite supérieure de la plage qui doit contenir tous les niveaux de gris significatifs, déplacez la ligne rouge.
 - ▶ SICAT Function adapte tous les niveaux de gris en conséquence dans la vue de coupe **Axial**.
 - ▶ SICAT Function marque en rouge tous les niveaux de gris supérieurs au niveau de gris significatif le plus haut.
- 6. Naviguez dans les coupes axiales. Assurez-vous qu'aucun niveau de gris significatif n'est marqué en rouge. Si nécessaire, déplacez encore une fois la ligne rouge.
- 7. Cliquez sur **OK**.
- ▶ La fenêtre **Adapter les niveaux de gris** se ferme et SICAT Function représente le volume conformément aux niveaux de gris adaptés, dans toutes les vues.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter les niveaux de gris** :



- Pour évaluer toutes les coupes à la fois, vous pouvez cliquer sur l'icône **Activer le mode projection coronale**. Un clic sur le bouton **Activer le mode coupes axiales** vous ramène dans la vue de coupe **Axial**.
- Pour déplacer les deux limites à la fois, vous pouvez cliquer sur la plage qui doit contenir tous les niveaux de gris significatifs et la déplacer.
- Pour restaurer les réglages standard de la plage qui doit contenir tous les niveaux de gris significatifs, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Si vous ne souhaitez pas marquer les niveaux de gris coupés, vous pouvez cliquer sur l'icône **Ne pas marquer les niveaux de gris coupés**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

26 ORIENTATION DU VOLUME ET ZONE PANORAMIQUE



Si une adaptation de l'orientation du volume s'avère nécessaire, effectuez cette adaptation au début de votre travail sur la radiographie 3D. Si vous adaptez l'orientation du volume ultérieurement, vous serez éventuellement obligé de refaire en partie votre diagnostic ou votre planification.

ORIENTATION DU VOLUME

Vous pouvez adapter l'orientation du volume pour toutes les vues en tournant le volume autour des trois axes principaux. Ceci peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants :


- Positionnement non optimal du patient lors de la radiographie 3D
- Orientation en fonction du cas d'application, p. ex. orientation des coupes axiales parallèle à l'horizontale de Francfort ou au plan d'occlusion
- Optimisation de la vue panoramique

Si vous adaptez l'orientation du volume dans SICAT Fonction, toutes les autres applications SICAT reprennent vos adaptations.

Pour adapter l'orientation du volume, reportez-vous au paragraphe *Adapter l'orientation du volume* [▶ Page 137 - Standalone].

ZONE PANORAMIQUE

SICAT Function calcule la vue **Panorama** sur la base du volume et de la zone panoramique. Pour optimiser la vue **Panorama**, il convient d'adapter la zone panoramique aux deux maxillaires du patient. Cette opération est importante pour l'efficacité du diagnostic et de la planification du traitement.

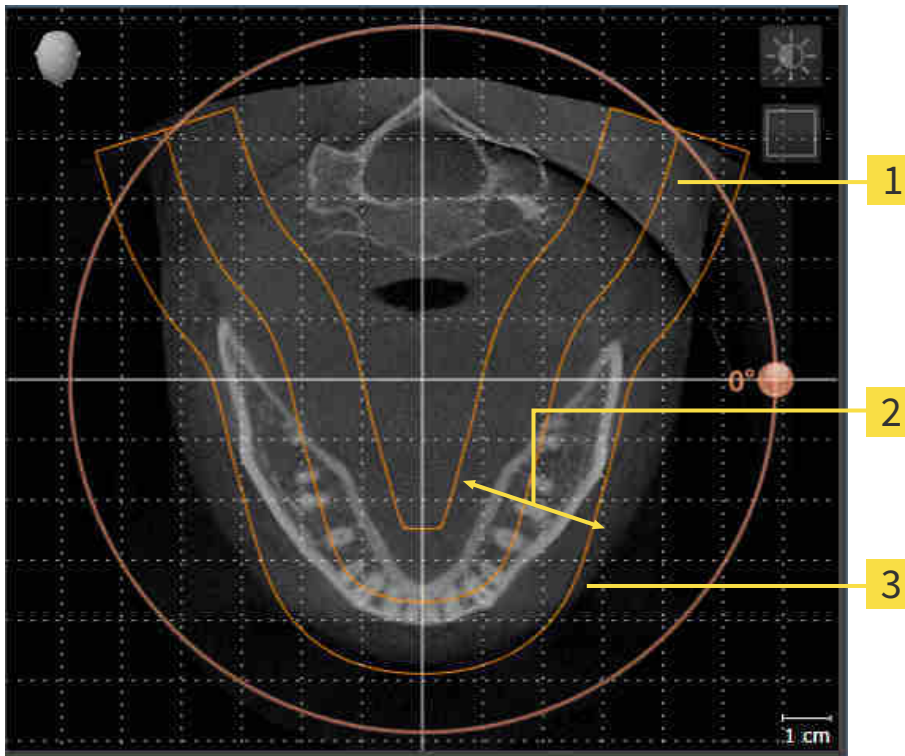

1 Courbe panoramique

2 Épaisseur

3 Zone panoramique

La zone panoramique est définie par les deux composants suivants :

- Forme et position de la courbe panoramique
- Épaisseur de la zone panoramique

Pour une adaptation optimale de la zone panoramique, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies :

- La zone panoramique doit contenir l'intégralité des dents des deux mâchoires
- La zone panoramique doit être aussi fine que possible.

Si vous adaptez la zone panoramique dans SICAT Function, toutes les autres applications SICAT reprennent vos adaptations.

Pour adapter la zone panoramique, reportez-vous au paragraphe *Adapter la zone panoramique* [► Page 142 - Standalone].

26.1 ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME

Vous trouverez des informations générales sur l'orientation du volume dans *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 135 - Standalone].

L'adaptation de l'orientation du volume se compose des étapes suivantes :

- Ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**
- Tourner le volume dans la vue **Coronal**
- Tourner le volume dans la vue **Sagittal**
- Tourner le volume dans la vue **Axial**


OUVRIR LA FENÊTRE "ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME ET LA ZONE PANORAMIQUE"

☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



- Cliquez sur l'icône **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**.

► La fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** s'ouvre :

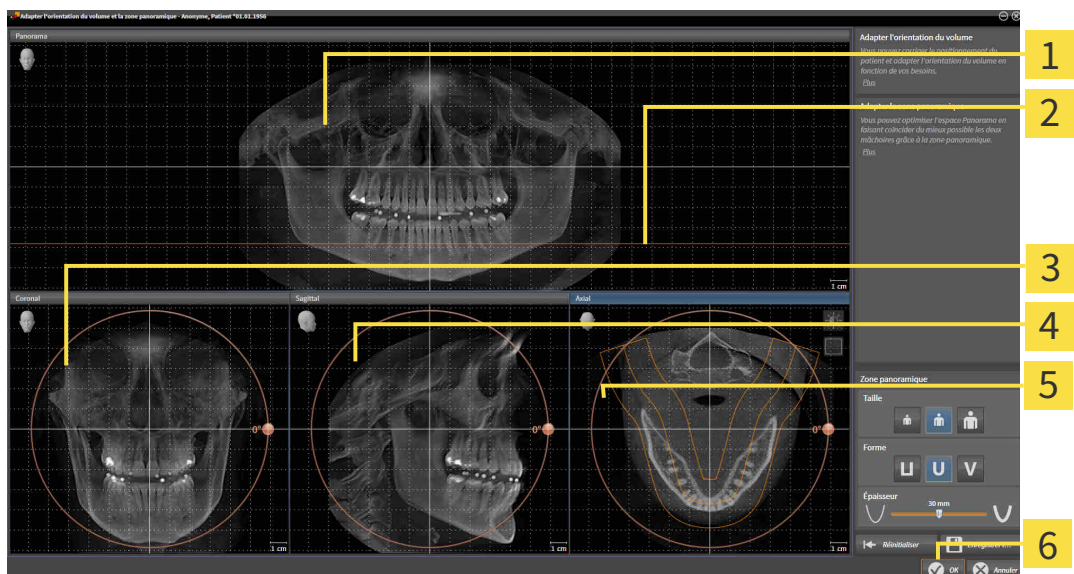

1 Panorama-Vue

2 Ligne de référence axiale

3 CoronalVue avec bouton de réglage **Rotation**

4 SagittalVue avec bouton de réglage **Rotation**

5 AxialVue avec bouton de réglage **Rotation**

6 Bouton **OK**

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE CORONAL

1. Activez la vue **Coronal** :




- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Activer le mode coupes ou symbole Activer le mode projection | 4 Ligne de référence horizontale |
| 2 Centre de rotation | 5 Ligne de référence verticale |
| 3 Rotation Bouton de réglage | |

2. Assurez-vous que le mode projection est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.
3. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
4. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
5. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Coronal** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
6. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE SAGITTAL

1. Activez la vue **Sagittal** :

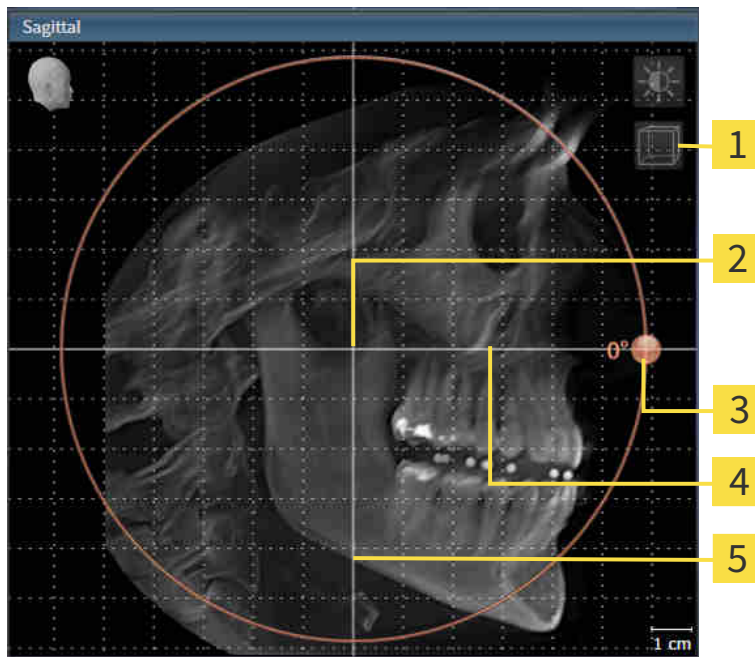


- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Activer le mode coupes ou symbole Activer le mode projection | 4 Ligne de référence horizontale |
| 2 Centre de rotation | 5 Ligne de référence verticale |
| 3 Rotation Bouton de réglage | |

2. Assurez-vous que le mode projection est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.
3. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
4. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
5. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Sagittal** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
6. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE AXIAL

1. Activez la vue **Axial** :

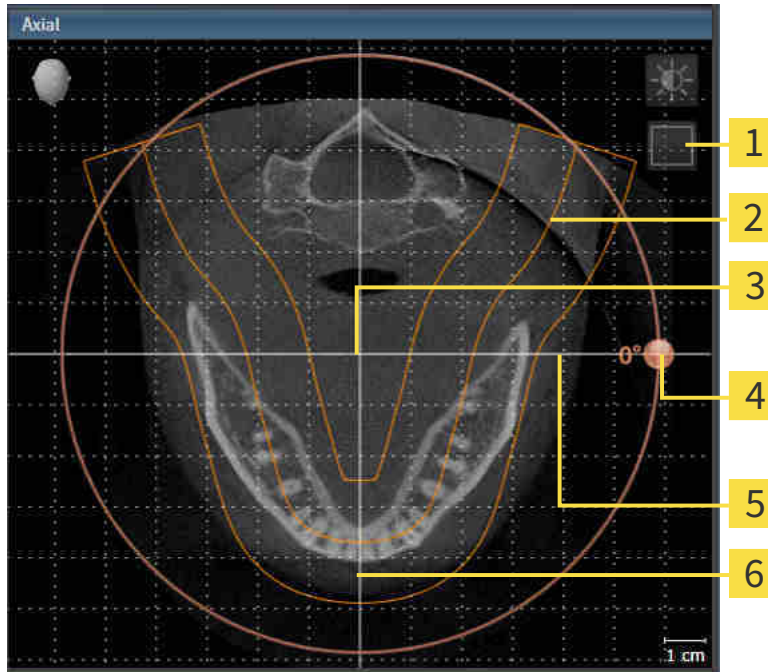

- | | |
|---|--|
| 1 Symbole Activer le mode projection ou symbole Activer le mode coupes | 4 Rotation Bouton de réglage |
| 2 Zone panoramique | 5 Ligne de référence horizontale |
| 3 Centre de rotation | 6 Ligne de référence verticale |

2. Assurez-vous que le mode coupes est activé. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes**.
3. Naviguez jusqu'à une coupe contenant les racines des dents mandibulaires, par exemple en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la ligne de référence axiale dans la vue panoramique et en déplaçant la souris vers le haut ou vers le bas tout en maintenant le bouton gauche enfoncé.
4. Si nécessaire, déplacez la zone panoramique dans la vue **Axial** en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la zone panoramique et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton gauche enfoncé. SICAT Function déplace le centre de rotation, la ligne de référence horizontale et la ligne de référence verticale en conséquence.
5. Amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
6. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
7. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - SICAT Function tourne le volume dans la vue **Axial** en suivant un cercle autour du centre de rotation, et adapte les autres vues en conséquence.
8. Une fois obtenue la rotation du volume souhaitée, relâchez le bouton gauche de la souris. Orientez-vous à l'aide de la zone panoramique, de ligne de référence horizontale, de la ligne de référence verticale et du quadrillage.

9. Pour enregistrer vos adaptations, cliquez sur **OK**.
 - ▶ Si l'adaptation du volume a des répercussions sur des objets existants dans des applications SICAT, SICAT Function ouvre une fenêtre d'avertissement qui vous informe sur ces conséquences exactes.
10. Si vous souhaitez malgré cela effectuer l'orientation du volume, cliquez dans la fenêtre d'avertissement sur le bouton **Adapter**.
 - ▶ SICAT Function enregistre l'orientation du volume adaptée et représente le volume dans les autres vues avec l'orientation correspondante.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D en activant la vue souhaitée et en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 112 - Standalone].
- Vous pouvez zoomer des vues. SICAT Function synchronise le zoom entre les vues, sauf la vue **Axial**.
- Pour réinitialiser l'orientation du volume et la zone panoramique, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Pour enregistrer l'orientation actuelle du volume et la zone panoramique actuelle en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer le réglage par défaut**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

26.2 ADAPTER LA ZONE PANORAMIQUE

Vous trouverez des informations générales sur la zone panoramique dans *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 135 - Standalone].

L'adaptation de la zone panoramique se compose des étapes suivantes :


- Ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**
- Adapter la position de coupe de la vue **Axial**
- Déplacer la zone panoramique
- Tourner le volume dans la vue **Axial**
- **Taille** Adapter la **Forme** et l'**Épaisseur** de la zone panoramique

OUVRIRE LA FENÊTRE "ADAPTER L'ORIENTATION DU VOLUME ET LA ZONE PANORAMIQUE"

☑ L'étape de flux de travail **Préparer** est déjà développée.



- Cliquez sur l'icône **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique**.
- La fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** s'ouvre :

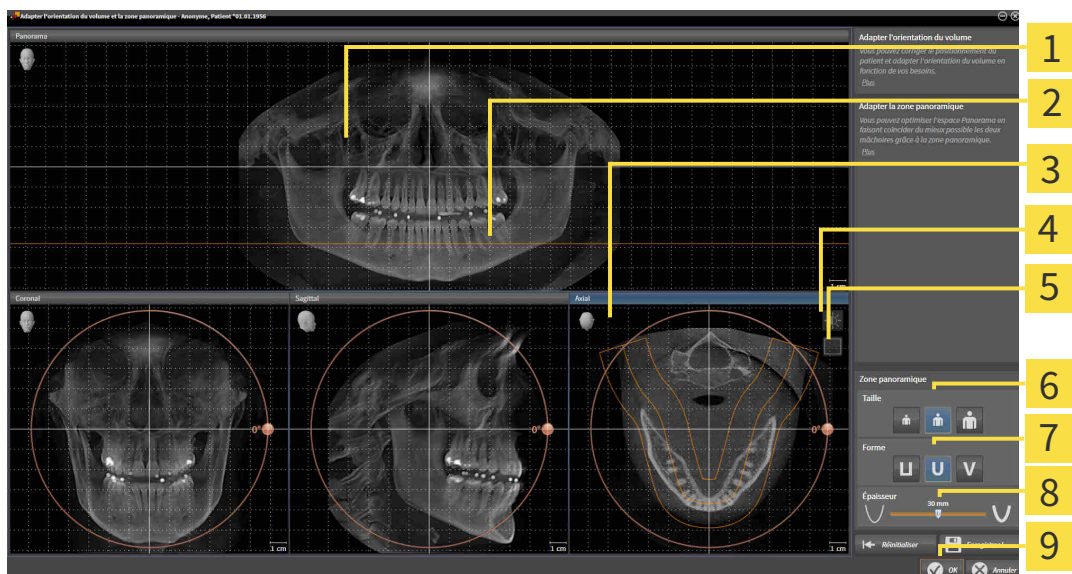

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 6 Taille-Boutons |
| 2 Ligne de référence axiale | 7 Forme-Boutons |
| 3 AxialVue avec curseur Rotation | 8 ÉpaisseurCurseur |
| 4 Symbole Adapter le contraste et la luminosité | 9 Bouton OK |
| 5 Symbole Activer le mode projection ou symbole Activer le mode coupes | |

ADAPTER LA POSITION DE COUPE DE LA VUE AXIAL



1. Assurez-vous que le mode coupe est activé dans la vue **Axial**. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode coupes**.
2. Dans la vue **Panorama**, amenez le pointeur de la souris sur la ligne de référence axiale. La ligne de référence axiale représente la position de coupe actuelle de la vue **Axial**.
3. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
4. Déplacez la souris vers le haut ou vers le bas.
 - ▶ La coupe de la vue **Axial** est adaptée en fonction de la position de la ligne de référence axiale dans la vue **Panorama**.
5. Lorsque la ligne de référence axiale se trouve sur les racines des dents mandibulaires, relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ La vue **Axial** conserve la coupe actuelle.

DÉPLACER LA ZONE PANORAMIQUE

1. Dans la vue **Axial**, déplacez le pointeur de la souris sur la zone panoramique.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
 - ▶ Le pointeur de la souris change de forme :
3. Déplacez la souris.
 - ▶ SICAT Function déplace la zone panoramique en fonction de la position du pointeur de la souris.
4. Lorsque la courbe centrale de la zone panoramique suit le tracé des racines des dents de la mandibule, relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ La zone panoramique conserve sa position actuelle.

TOURNER LE VOLUME DANS LA VUE AXIAL

1. Dans la vue **Axial**, amenez le pointeur de la souris sur le bouton de réglage **Rotation**.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Déplacez le bouton de réglage **Rotation** sur le cercle dans le sens voulu.
 - ▶ SICAT Function tourne alors le volume dans la vue **Axial** en suivant un cercle autour du centre de rotation et adapte les autres vues en conséquence.
4. Lorsque le tracé des racines des dents de la mandibule suit la courbe centrale de la zone panoramique, relâchez le bouton gauche de la souris.

ADAPTER LA TAILLE, LA FORME ET L'ÉPAISSEUR DE LA ZONE PANORAMIQUE



1. Sélectionnez la **Taille** de la zone panoramique la plus adaptée à la mandibule du patient en cliquant sur le bouton **Taille** correspondant.



2. Sélectionnez la **Forme** de la zone panoramique la plus adaptée à la mandibule du patient en cliquant sur le bouton **Forme** correspondant.



3. Assurez-vous que le mode projection est activé dans la vue **Axial**. Si nécessaire, cliquez sur l'icône **Activer le mode projection**.



4. Sélectionnez l'**Épaisseur** de la zone panoramique en déplaçant le curseur **Épaisseur**. Assurez-vous que la zone panoramique contient l'intégralité des dents des deux mâchoires. Maintenez l'épaisseur aussi faible que possible.

5. Pour enregistrer vos adaptations, cliquez sur **OK**.

- SICAT Function enregistre l'orientation du volume et la zone panoramique adaptées et représente la vue **Panorama** en conséquence.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D en activant la vue souhaitée et en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [► Page 112 - Standalone].
- Vous pouvez zoomer des vues. SICAT Function synchronise le zoom entre les vues, sauf la vue **Axial**.
- Pour réinitialiser l'orientation du volume et la zone panoramique, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Pour enregistrer l'orientation actuelle du volume et la zone panoramique actuelle en tant que valeurs par défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton **Enregistrer le réglage par défaut**.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

27 DONNÉES DE MOUVEMENT

Les mouvements et les positions de la mâchoire propres au patient fournissent des informations sur la dynamique de mastication du patient. Vous pouvez utiliser ces informations pour l'analyse et le diagnostic du patient. En outre, vous pouvez intégrer ces données dans la planification thérapeutique du patient.

SICAT Function visualise les mouvements et les positions de la mâchoire propres au patient. L'application prend en charge les sources suivantes de données de mouvement de la mâchoire :

- Données de mouvement d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire (JMT)
- Positions statiques d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire
- Positions du mordu buccal prises avec une caméra intra-orale

Vous trouverez une liste des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles dans le paragraphe *Appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles* [▶ Page 146 - Standalone].

Vous pouvez importer les positions du mordu buccal avec les empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Empreintes optiques* [▶ Page 158 - Standalone].

En plus de l'importation des données de mouvement de la mâchoire, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour préparer la représentation de ces données. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Flux de travail standard de SICAT Function* [▶ Page 33 - Standalone].

Une fois toutes les données nécessaires préparées, les actions suivantes relatives aux données de mouvement de la mâchoire sont disponibles :

- *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 169 - Standalone]
- *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [▶ Page 172 - Standalone]
- *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [▶ Page 173 - Standalone]
- *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [▶ Page 174 - Standalone]

Précision de la représentation pour les données de mouvement de la mâchoire < 0,6 mm

27.1 APPAREILS D'ACQUISITION DU MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE COMPATIBLES



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination n'est pas appropriée peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination est conforme à l'utilisation des données de mouvement de la mâchoire par SICAT Function.



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire non pris en charge ou d'appareils d'enregistrement non compatibles peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des données de mouvement de la mâchoire qui ont été acquises avec une combinaison supportée d'un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire (par exemple SICAT JMT*) et d'un appareil de recalage compatible (par exemple SICAT Fusion Bite).

Assurez-vous d'acquérir les données de mouvement de la mâchoire uniquement avec un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatible combiné à un appareil de recalage supporté. Importez exclusivement dans SICAT Function des données de mouvement de la mâchoire provenant d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire compatibles. Vous pouvez uniquement importer dans SICAT Function des données de mouvement acquises avec des appareils qui prennent en charge le format SICAT JTI, interface V1.0.

SICAT Function supporte actuellement les combinaisons suivantes d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire et d'appareils d'enregistrement :

- SICAT JMT* en combinaison avec un SICAT Fusion Bite, fabricant : SICAT GmbH & Co. KG, Brunnenallee 6, D-53177 Bonn

27.2 IMPORTER ET RECALER DES DONNÉES DE MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE D'APPAREILS DÉDIÉS


ATTENTION

L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.


ATTENTION

Des appareils inadaptés pour les données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données de mouvement de la mâchoire d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.


ATTENTION

Une acquisition incorrecte des données de mouvement de la mâchoire et des radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que les données de mouvement de la mâchoire et les radiographies 3D ont été acquises conformément aux instructions des fabricants des appareils. Utilisez le type de corps de référence indiqué.


ATTENTION

Des données de mouvement de la mâchoire qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données de mouvement de la mâchoire correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.


ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données de mouvement de la mâchoire peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données de mouvement de la mâchoire importées.


ATTENTION

Une qualité, une précision et une résolution insuffisantes des données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données de mouvement de la mâchoire présentant une qualité, une résolution et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou une qualité insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec du mécanisme de détection des marqueurs et du corps de référence. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant la détection correcte des marqueurs et du corps de référence.



Une position, un type et une orientation incorrects du corps de référence peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Après la détection du corps de référence par l'assistant JTM, contrôlez la position, le type et l'orientation corrects du corps de référence en tenant compte des radiographies 3D.



Un recalage incorrect des données de mouvement de la mâchoire sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données de mouvement de la mâchoire recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



Afin de garantir le recalage correct des données de mouvement de la mâchoire, SICAT recommande d'utiliser des données de radiographie 3D avec les paramètres suivants :

1. Épaisseur de coupe inférieure à 0,7 mm
2. Taille des voxels inférieure à 0,7 mm dans les trois dimensions



Avant d'importer dans SICAT Function les données de mouvement de la mâchoire acquises, vous devez exporter ces données à partir du logiciel de l'appareil d'acquisition des données de mouvement de la mâchoire. L'exportation de fichiers appropriés pour SICAT Function est décrite dans la notice d'instruction de l'appareil d'acquisition des données de mouvement de la mâchoire.



Si l'étude ouverte contient des données de mouvement de la mâchoire déjà recalées, vous devez confirmer le fait que SICAT Function supprime ces données lorsque vous rouvrez l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**.



Pendant la procédure d'importation des données de mouvement de la mâchoire, vous devez marquer trois marqueurs sphériques dans la vue **Axial** de l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**, afin que SICAT Function puisse les détecter ensuite.


Vous trouverez des informations générales sur les données de mouvement de la mâchoire dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 145 - Standalone].

Procédez de la manière suivante pour importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 90 - Standalone].



1. Cliquez sur l'icône **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Dans l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - ▶ La fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** s'ouvre.
3. Sélectionnez dans la fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** le fichier des données de mouvement de la mâchoire désiré puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - ▶ La fenêtre **Chargement du fichier d'exportation JMT** se ferme et SICAT Function reporte le chemin du fichier des données de mouvement de la mâchoire désiré dans le champ **Chemin**.
 - ▶ La vue **Fourchette occlusale** affiche un aperçu de la fourchette occlusale qui a été utilisée pendant l'acquisition des données de mouvement de la mâchoire.
 - ▶ La zone **Patient** et la zone **Acquisition** affichent des informations du fichier des données de mouvement de la mâchoire :

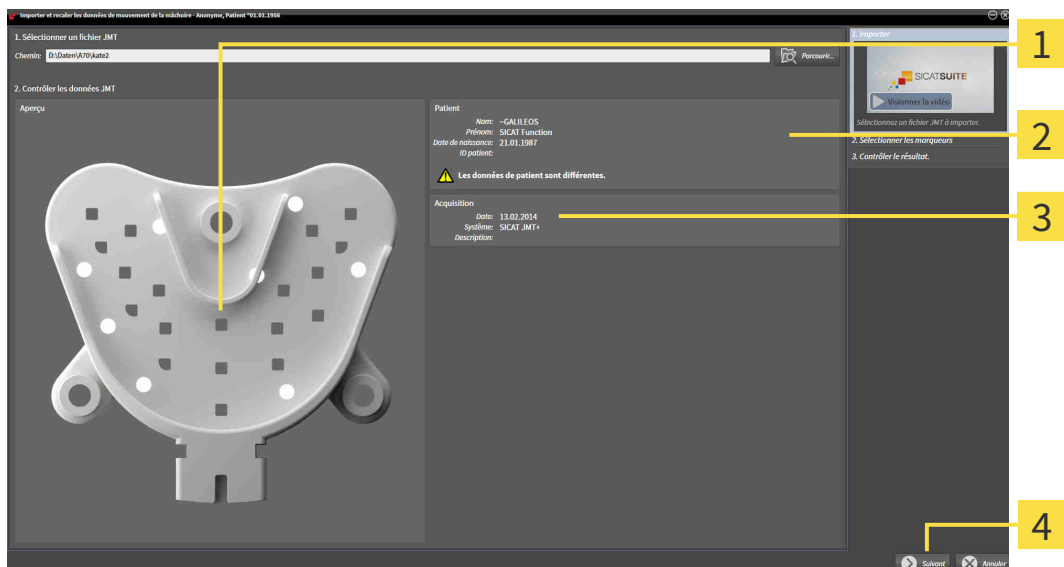

1 Vue SICAT Fusion Bite


3 Zone **Acquisition**

2 Zone **Patient**

4 Bouton **Suivant**

4. Assurez-vous que le fichier des données de mouvement de la mâchoire correspond bien à l'étude active.
5. Cliquez sur **Suivant**.

► L'étape **Sélectionner les marqueurs** s'ouvre :

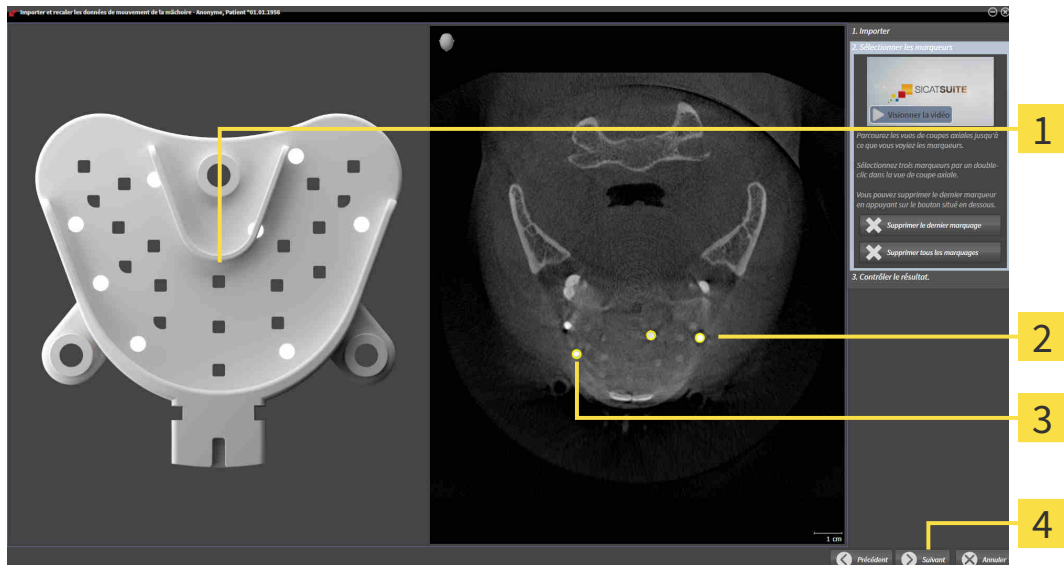


1 Fourchette occlusale-Vue

3 Marquage sélectionné

2 Axial-Vue

4 Bouton **Suivant**

6. Naviguez dans les coupes axiales jusqu'à ce que la vue de coupe **Axial** affiche au moins un marqueur sphérique.
7. Dans la vue de coupe **Axial**, double-cliquez sur un marqueur sphérique.
 - SICAT Function marque le marqueur sphérique.
8. Répétez la dernière étape jusqu'à ce que trois marqueurs sphériques soient marqués.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 - SICAT Function enregistre les données de mouvement de la mâchoire.

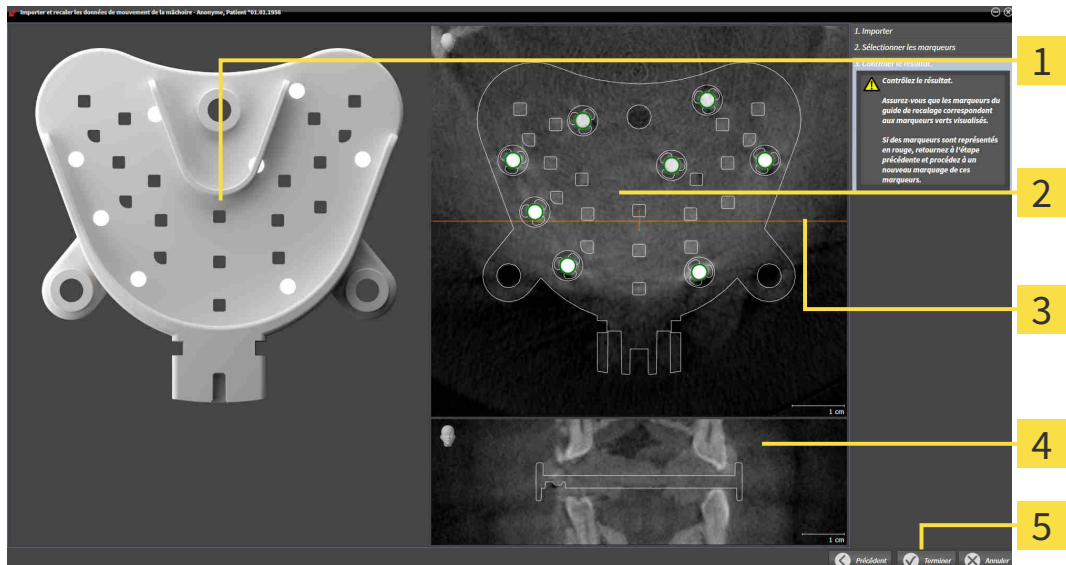► L'étape **Contrôler le résultat** s'ouvre :**1** Fourchette occlusale-Vue**4** Coronal-Vue**2** Axial-Vue de coupe**5** Bouton **Terminer****3** Ligne de référence coronale

10. Assurez-vous que les marqueurs sphériques sur la **Fourchette occlusale** et dans la vue de coupe **Axial** coïncident.
 11. Assurez-vous dans la vue **Coronal** que SICAT Function a correctement détecté la position de la fourchette occlusale. Déplacez la ligne de référence coronale dans la vue **Axial** ou naviguez à travers les coupes dans la vue **Coronal**.
 12. Cliquez sur **Terminer**.
- SICAT Function importe les données de mouvement de la mâchoire enregistrée.
 - L'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** se ferme.
 - SICAT Function affiche un objet **Données de mouvement** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [► Page 96 - Standalone].



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans l'assistant **Importer et recalcr les données de mouvement de la mâchoire** :

- Si vous n'êtes pas satisfait du dernier marqueur, vous pouvez cliquer sur le bouton **Supprimer le dernier marqueur**.
- Si la **Fourchette occlusale** n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Sélectionner les marqueurs** avec des marqueurs placés en d'autres positions.
- Si vous voulez annuler l'importation et le recalage des données de mouvement de la mâchoire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

28 SEGMENTATION



Des artefacts excessifs ou une résolution insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec de la procédure de segmentation ou des résultats insuffisants. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant une qualité suffisante de la segmentation des structures anatomiques concernées.



Une qualité insuffisante de la segmentation peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez que la qualité de la segmentation est suffisante pour l'utilisation prévue.

Pour représenter le mouvement de la mandibule, vous devez définir la limite entre la mandibule et l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle la segmentation. L'assistant **Segmentation de la mandibule** vous permet de segmenter non seulement la mandibule, mais aussi les fosses du patient. Dans SICAT Function, la segmentation est une procédure semi-automatique.

Procédure semi-automatique signifie que vous devez marquer manuellement des parties de la mandibule et des fosses à l'aide des outils de dessin dans l'assistant **Segmentation de la mandibule**. Après un marquage, l'assistant de segmentation calcule automatiquement des parties similaires.

Les actions suivantes sont disponibles pour la segmentation de la mandibule et des fosses :

- *Segmenter la mandibule* [► Page 153 - Standalone]
- *Segmenter les fosses* [► Page 155 - Standalone]

Après la segmentation de la mandibule, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Visualiser et visionner des mouvements anatomiques individuels du patient dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].
- Visualiser des tracés de mouvements anatomiques individuels du patient dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 172 - Standalone].
- Visualisation des articulations temporo-mandibulaires en mouvement dans l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 175 - Standalone].

28.1 SEGMENTER LA MANDIBULE



À chaque démarrage, l'assistant **Segmenter la mandibule et les condyles** effectue un calcul préliminaire de la segmentation. La durée de ce calcul dépend des performances de votre ordinateur.



La segmentation de SICAT Fonction utilise des régions au lieu de contours anatomiques. Par conséquent, il ne vous est que rarement nécessaire de redessiner des contours anatomique avec exactitude. À la place, marquez des régions contigües en plaçant des traits dans les régions.

Vous trouverez des informations générales sur la segmentation dans *Segmentation* [► Page 152 - Standalone].


Procédez de la manière suivante pour segmenter la mandibule :

- ☑ L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 90 - Standalone].



1. Cliquez sur l'icône **Segmenter la mandibule et les condyles**.

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** s'ouvre :

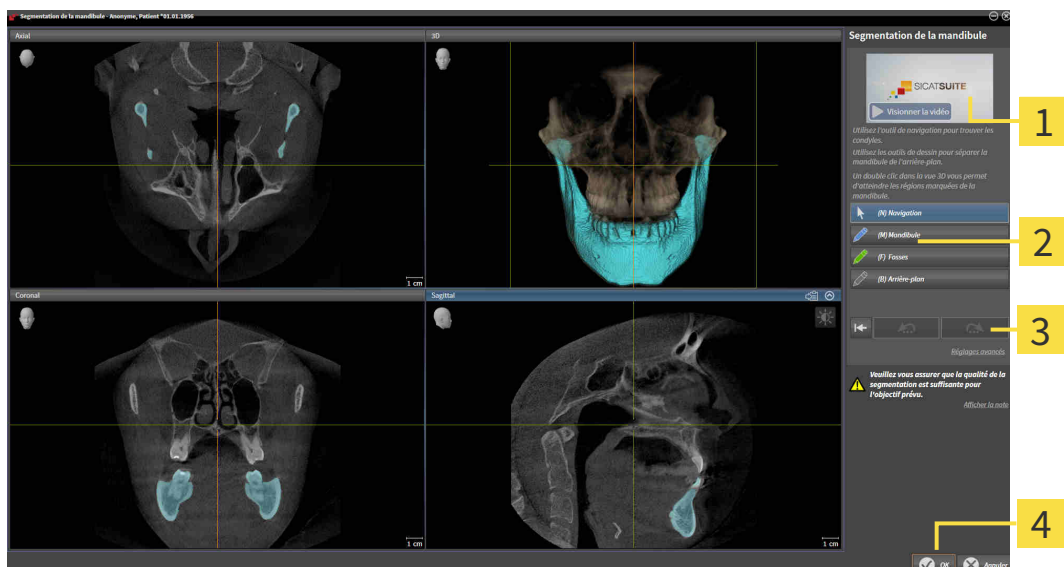

1 Exemple de vidéo

3 Bouton **Réinitialiser**, bouton **Annuler** et bouton **Répéter**

2 Zone **Outils de dessin**

4 Bouton **OK**

► L'assistant **Segmentation de la mandibule** effectue un calcul préliminaire de la segmentation.

2. Adaptez la vue **Axial**, la vue **Coronal**, ou la vue **Sagittal** de manière à ce que la mandibule et les fosses soient visibles.



3. Cliquez sur le bouton **Mandibule**.

4. Amenez le pointeur de la souris sur la mandibule dans la vue de coupe 2D de votre choix.

► Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un crayon.

5. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.

6. Suivez la région interne de la mandibule avec le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente votre marquage à l'aide d'une ligne bleue.
7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function segmente la mandibule en fonction de votre marquage.
8. Si vous voulez ajouter des régions supplémentaires à la mandibule, cliquez sur l'icône **Navigation**, naviguez dans une vue 2D jusqu'aux structures voulues et marquez-les comme décrit précédemment.
9. Si la segmentation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton **OK**.
 - ▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** se ferme.
 - ▶ SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [▶ Page 96 - Standalone].
 - ▶ La vue **3D** représente le résultat de la segmentation.



Vous pouvez utiliser l'outil de dessin **Arrière-plan**, soit pour marquer des régions comme arrière-plan, soit pour corriger des régions trop grandes de la segmentation semi-automatique.

Vous pouvez également poursuivre la segmentation ou l'améliorer ultérieurement.



Vous pouvez naviguer dans les vues de coupes 2D en commutant sur le mode **Navigation**.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles** :

- Des raccourcis clavier spéciaux sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Raccourcis clavier* [▶ Page 234 - Standalone].
- Si vous double-cliquez dans la vue **3D** sur une position appartenant à la région segmentée, toutes les vues de coupe 2D visualisent la coupe correspondante. De plus, SICAT Function centre les réticules sur cette position. Utilisez cette aide à la navigation par exemple pour corriger des régions discontinues ou fermer des trous.
- Si la segmentation ne correspond pas aux particularités anatomiques, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.
- Si vous voulez restaurer une opération annulée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Répéter**.
- Pour annuler toutes les étapes de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Dans de rares cas, il peut arriver que le calcul préliminaire du jeu de données ne fournisse pas un résultat optimal. Dans un tel cas, vous pouvez cliquer sur **Réglages avancés** et décocher la case **Détecter automatiquement l'arrière-plan**. À l'aide de l'outil de dessin **Arrière-plan**, vous pouvez ensuite marquer les régions qui ne font pas partie de l'os mandibulaire ou des fosses avec au moins un trait.
- Si vous voulez annuler la segmentation des condyles et de la région mandibulaire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.



28.2 SEGMENTER LES FOSSES

Depuis l'introduction de l'espace de travail **TMJ**, la segmentation des fosses n'est plus absolument nécessaire, dans la plupart des cas. Utilisez l'espace de travail **TMJ** pour évaluer la relation dynamique condyle-fosse sans segmentation.



À chaque démarrage, l'assistant **Segmenter la mandibule et les condyles** effectue un calcul préliminaire de la segmentation. La durée de ce calcul dépend des performances de votre ordinateur.



La segmentation de SICAT Fonction utilise des régions au lieu de contours anatomiques. Par conséquent, il ne vous est que rarement nécessaire de redessiner des contours anatomique avec exactitude. À la place, marquez des régions contiguës en plaçant des traits dans les régions.

Vous trouverez des informations générales sur la segmentation dans *Segmentation* [▶ Page 152 - Standalone].


Procédez de la manière suivante pour segmenter les fosses :

- ☑ L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [▶ Page 90 - Standalone].



1. Cliquez sur l'icône **Segmenter la mandibule et les condyles**.

▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** s'ouvre :

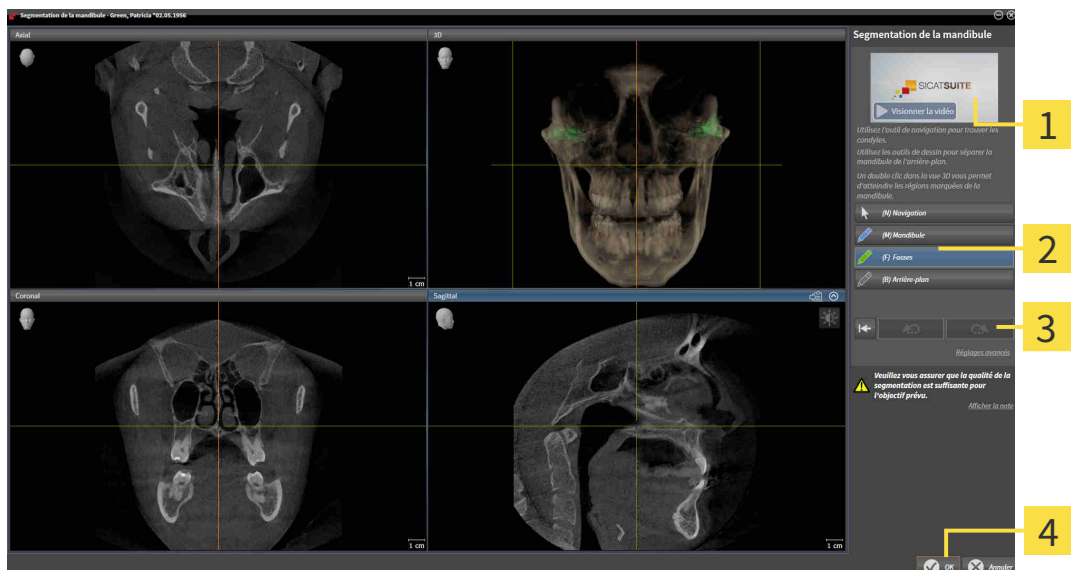

1 Exemple de vidéo

3 Bouton **Réinitialiser**, bouton **Annuler** et bouton **Répéter**

2 Zone **Outils de dessin**

4 Bouton **OK**

▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** effectue un calcul préliminaire de la segmentation.

2. Adaptez la vue **Axial**, la vue **Coronal**, ou la vue **Sagittal** de manière à ce que la mandibule et les fosses soient visibles.



3. Cliquez sur le bouton **Fosses**.

4. Amenez le pointeur de la souris sur les fosses dans la vue de coupe 2D de votre choix.

- ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'un crayon.
- 5. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
- 6. Suivez la région interne des fosses avec le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente votre marquage à l'aide d'une ligne verte.
- 7. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function segmente les fosses en fonction de votre marquage.
- 8. Si vous voulez ajouter des régions supplémentaires aux fosses, cliquez sur l'icône **Navigation**, naviguez dans une vue 2D jusqu'aux structures voulues et marquez-les comme décrit précédemment.
- 9. Si la segmentation correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton **OK**.
 - ▶ L'assistant **Segmentation de la mandibule** se ferme.
 - ▶ SICAT Function affiche un objet **Régions du volume** dans le **Navigateur d'objets**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Objets de SICAT Function* [▶ Page 96 - Standalone].
 - ▶ La vue **3D** représente le résultat de la segmentation.



Vous pouvez utiliser l'outil de dessin **Arrière-plan**, soit pour marquer des régions comme arrière-plan, soit pour corriger des régions trop grandes de la segmentation semi-automatique.

Vous pouvez également poursuivre la segmentation ou l'améliorer ultérieurement.



Vous pouvez naviguer dans les vues de coupes 2D en commutant sur le mode **Navigation**.



En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles** :

- Des raccourcis clavier spéciaux sont disponibles dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Raccourcis clavier* [► Page 234 - Standalone].
- Si vous double-cliquez dans la vue **3D** sur une position appartenant à la région segmentée, toutes les vues de coupe 2D visualisent la coupe correspondante. De plus, SICAT Function centre les réticules sur cette position. Utilisez cette aide à la navigation par exemple pour corriger des régions discontinues ou fermer des trous.
- Si la segmentation ne correspond pas aux particularités anatomiques, vous pouvez cliquer sur le bouton **Annuler**.
- Si vous voulez restaurer une opération annulée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Répéter**.
- Pour annuler toutes les étapes de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.
- Dans de rares cas, il peut arriver que le calcul préliminaire du jeu de données ne fournisse pas un résultat optimal. Dans un tel cas, vous pouvez cliquer sur **Réglages avancés** et décocher la case **Détecter automatiquement l'arrière-plan**. À l'aide de l'outil de dessin **Arrière-plan**, vous pouvez ensuite marquer les régions qui ne font pas partie de l'os mandibulaire ou des fosses avec au moins un trait.
- Si vous voulez annuler la segmentation des condyles et de la région mandibulaire, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

29 EMPREINTES OPTIQUES



Vous pouvez uniquement importer et recalcr des empreintes optiques pour des données de radiographies créées par des appareils de radiographie 3D de Sirona.

SICAT Function peut représenter simultanément des données de radiographie et des empreintes optiques coordonnées du même patient. La représentation combinée apporte des informations supplémentaires pour l'analyse et le diagnostic. En outre, la mise en œuvre thérapeutique est basée sur les empreintes optiques.

Les actions suivantes sont nécessaires pour utiliser des données d'empreintes optiques dans SICAT Function :

- Importation d'un fichier d'empreintes optiques (composé d'une empreinte de la mandibule et d'une empreinte du maxillaire) contenant des empreintes optiques d'un système de prise d'empreinte tel que CEREC avec une licence Open GALILEOS.
- Recalage d'empreintes optiques sur les données de radiographie

SICAT Function prend en charge les formats de fichiers d'empreintes optiques suivants :

- Fichiers SIXD contenant une empreinte optique du maxillaire et une empreinte optique de la mandibule
- Fichiers SSI contenant une empreinte optique du maxillaire et une empreinte optique de la mandibule
- Les fichiers STL qui contiennent une empreinte optique des maxillaires ou une empreinte optique des mandibules (licence **SICAT Suite STL Import** nécessaire)

Les outils suivants sont disponibles pour les empreintes optiques :

- *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone]
- *Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT* [► Page 166 - Standalone]
- Activer, masquer et afficher des empreintes optiques - vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone].
- Focaliser les empreintes optiques et supprimer les empreintes optiques - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 95 - Standalone].

Les empreintes optiques en format STL nécessitent une étape supplémentaire à l'importation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Étapes supplémentaires pour les empreintes optiques en format STL*. [► Page 165 - Standalone].

29.1 IMPORTER ET RECALER LES EMPREINTES OPTIQUES


ATTENTION

L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.


ATTENTION

Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.


ATTENTION

Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.


ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.


ATTENTION

Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.


ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou des points manquants pour le recalage peuvent entraîner l'échec de la procédure de recalage d'empreintes optiques. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des empreintes optiques et des radiographies 3D permettant un recalage précis.


ATTENTION

La sélection, dans le procédé de recalage d'empreintes optiques, de marquages qui ne coïncident pas peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Lorsque vous recalez des données d'empreintes optiques, sélectionnez soigneusement, dans les radiographies 3D et dans les empreintes optiques, des marquages qui coïncident.



Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.



L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** indique toujours les données patient et ignore le réglage **Anonymiser** afin que vous puissiez contrôler si les données de radiographie 3D et les empreintes optiques correspondent.



Vous pouvez utiliser la **Fenêtre d'examen** pour vérifier qu'une empreinte optique est orientée avec précision par rapport aux données de radiographie. Vous pouvez décaler la **Fenêtre d'examen** et naviguer à travers les coupes dans la **Fenêtre d'examen**.

Vous trouverez des informations générales sur les empreintes optiques dans *Empreintes optiques* [► Page 158 - Standalone].


Procédez de la manière suivante pour importer et recaler des empreintes optiques :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.



1. Cliquez sur l'icône **Importer et recaler les empreintes optiques**.
 - L'assistant **Importer et recaler les empreintes optiques** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - La fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** s'ouvre.
3. Sélectionnez dans la fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** le fichier des données d'empreinte optique désiré, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - La fenêtre **Ouvrir le fichier des empreintes optiques** se ferme.


► SICAT Function ouvre le fichier d'empreintes optiques sélectionné :

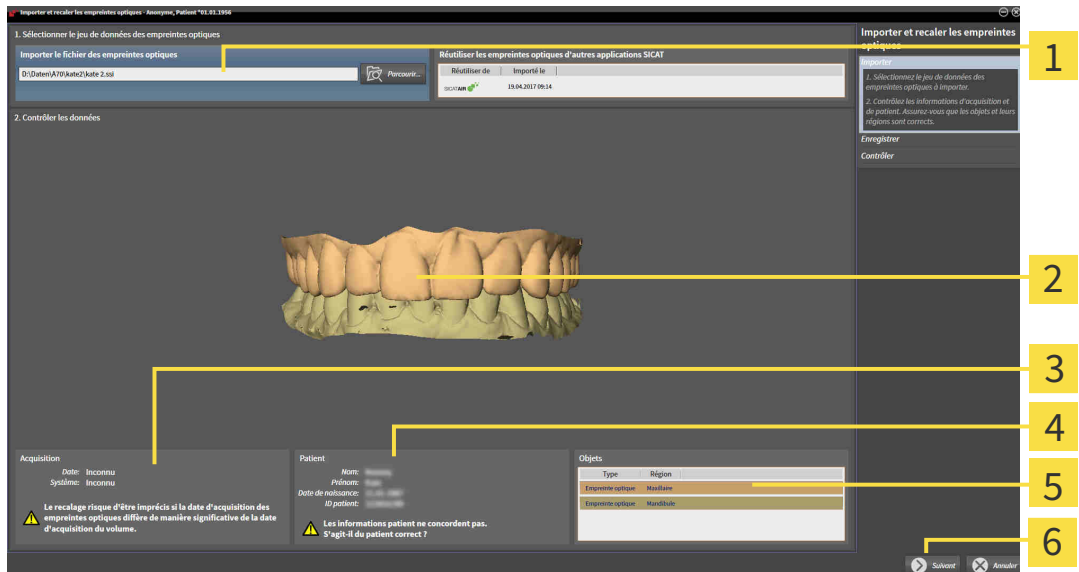

- | | |
|--|--|
| 1 Zone Importer le fichier des empreintes optiques | 4 Informations sur les patients |
| 2 3D Vue des empreintes optiques | 5 Liste d'objets |
| 3 Informations sur l'acquisition | 6 Bouton Suivant |


4. Vérifiez les informations relatives à l'acquisition et au patient.
5. Assurez-vous que les objets et leurs régions sont corrects. La couleur de fond dans la liste d'objets correspond à la couleur des objets dans la vue **3D**.
6. Cliquez sur **Suivant**.

- ▶ Si les données patient sont différentes dans la radiographie 3D et dans l’empreinte optique, SICAT Function ouvre la fenêtre **Informations patient différentes**:

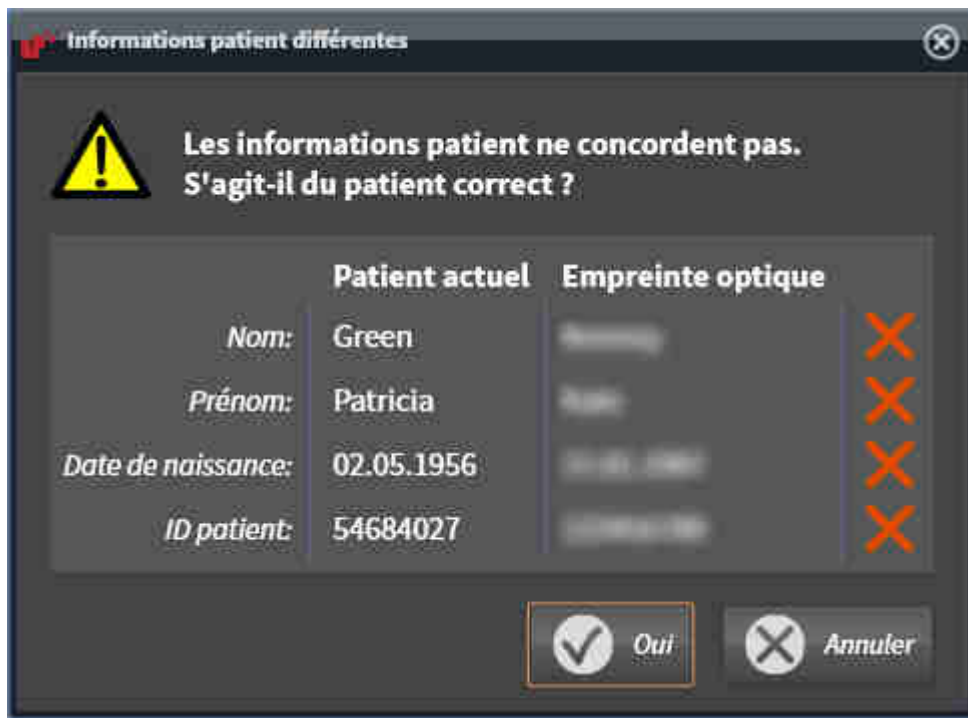


7. Comparez les informations patient. Si vous êtes certain(e) que l’empreinte optique correspond au patient actuel, appuyez sur le bouton **Oui**.

- ▶ L’étape **Enregistrer** s'ouvre pour la première empreinte optique :

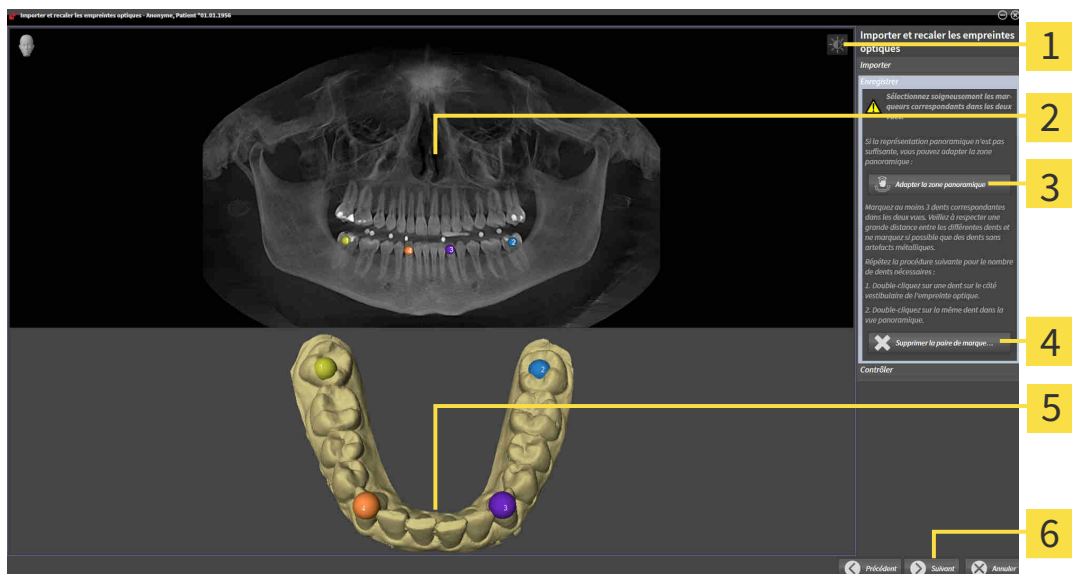

- | | |
|---|---|
| 1 Symbole Adapter le contraste et la luminosité | 4 Bouton Supprimer la paire de marqueurs active |
| 2 Panorama -Vue | 5 3D Vue représentant la première empreinte optique |
| 3 Bouton Adapter la zone panoramique | 6 Bouton Suivant |

8. Pour la première empreinte optique, double-cliquez sur une même dent dans la vue **Panorama** et dans la vue **3D**, sur le côté vestibulaire de l'empreinte optique. Veillez à respecter une grande distance entre les différentes dents et ne marquez que des dents sans artefacts métalliques. Répétez cette étape jusqu'à avoir marqué au moins trois dents correspondantes dans les deux vues.
 - ▶ Les marquages avec différentes couleurs et numéros dans les deux vues représentent les dents correspondantes de la première empreinte optique.
9. Cliquez sur **Suivant**.
 - ▶ SICAT Function calcule le recalage de la première empreinte optique sur les données de radiographie.
 - ▶ L'étape **Contrôler** s'ouvre pour la première empreinte optique :

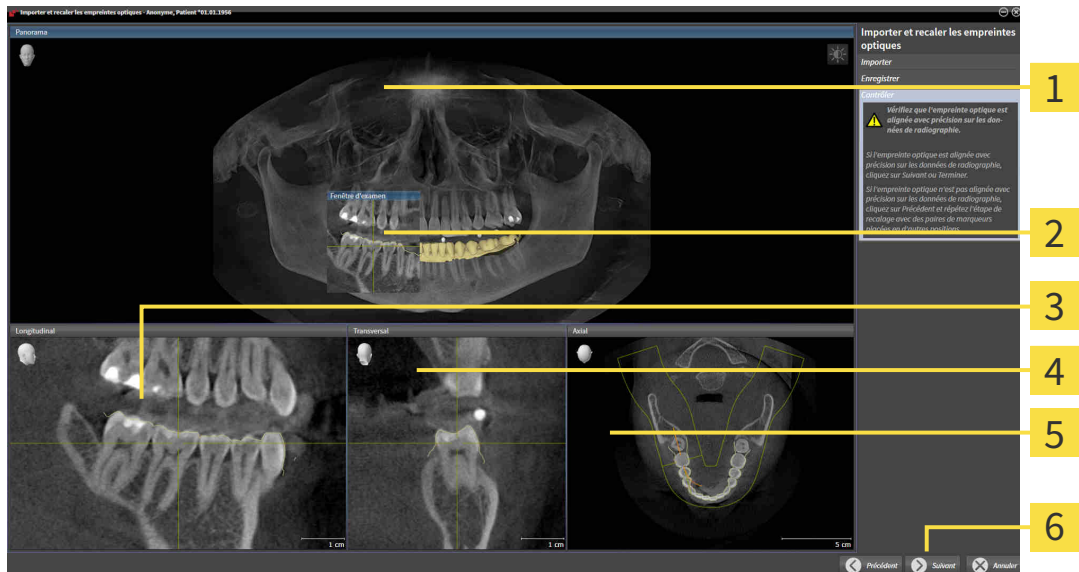

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Panorama-Vue | 4 Transversal-Vue |
| 2 Fenêtre d'examen | 5 Axial-Vue |
| 3 Longitudinal-Vue | 6 Bouton Suivant |

10. Vérifiez dans les vues de coupe 2D que l'empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie. Naviguez à travers les coupes et contrôlez les contours représentés.
11. Si l'empreinte optique n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Enregistrer** avec des paires de marqueurs placées en d'autres positions.
12. Si la première empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - ▶ L'étape **Enregistrer** s'ouvre pour la deuxième empreinte optique.
13. Pour la deuxième empreinte optique, double-cliquez sur une même dent dans la vue **Panorama** et dans la vue **3D**, sur le côté vestibulaire de l'empreinte optique. Veillez à respecter une grande distance entre les différentes dents et ne marquez si possible que des dents sans artefacts métalliques. Répétez cette étape jusqu'à avoir marqué au moins trois dents correspondantes dans les deux vues. Vous pouvez augmenter la précision du recalage en marquant jusqu'à cinq dents.
 - ▶ Les marquages avec différentes couleurs et numéros dans les deux vues représentent les dents correspondantes de la deuxième empreinte optique.

14. Cliquez sur **Suivant**.
 - ▶ SICAT Function calcule le recalage de la deuxième empreinte optique sur les données de radiographie.
 - ▶ L'étape **Contrôler** s'ouvre pour la deuxième empreinte optique.
15. Vérifiez dans les vues de coupe 2D que l'empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie. Naviguez à travers les coupes et contrôlez les contours représentés.
16. Si l'empreinte optique n'est pas alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Précédent** et répétez l'étape **Enregistrer** avec des paires de marqueurs placées en d'autres positions. Vous pouvez augmenter la précision du recalage en marquant jusqu'à cinq dents.
17. Si la deuxième empreinte optique est alignée avec précision sur les données de radiographie, cliquez sur le bouton **Terminer**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalage des empreintes optiques** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ajoute les empreintes optiques sélectionnées au **Navigateur d'objets**.
 - ▶ SICAT Function affiche les empreintes optiques recalées.

En plus de la procédure décrite, les actions suivantes sont disponibles dans l'assistant **Importer et recalage des empreintes optiques** :



- Vous pouvez adapter le contraste et la luminosité d'une vue 2D, en cliquant sur l'icône **Adapter le contraste et la luminosité**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter et restaurer le contraste et la luminosité des vues 2D* [▶ Page 112 - Standalone].
- Vous pouvez adapter la zone panoramique en cliquant sur l'icône **Adapter la zone panoramique**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter la zone panoramique* [▶ Page 142 - Standalone].
- Si vous voulez supprimer une paire de marqueurs à l'étape **Enregistrer**, vous pouvez sélectionner un marqueur de la paire et cliquer sur le bouton **Supprimer la paire de marqueurs active**.
- Si vous voulez annuler l'importation et le recalage d'empreintes optiques, vous pouvez cliquer sur **Annuler**.

29.2 ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES EMPREINTES OPTIQUES EN FORMAT STL.

Les fichiers STL ne contiennent aucune information sur la position et l'orientation d'empreintes optiques. C'est pourquoi, vous devez adapter la position et l'orientation si nécessaire :

Vous avez déjà activé une licence **SICAT Suite Importation STL**.

1. Ouvrez en format STL les empreintes optiques d'un fichier. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone].

► La fenêtre **Assistant d'importation STL** s'ouvre :



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Sélection de la mâchoire | 3 Inversement des côtés intérieur et extérieur |
| 2 Changement d'orientation | 4 Bouton OK |

2. Sélectionnez dans la zone **Mâchoire**, si l'empreinte optique contient le **maxillaire** ou de la **mandibule**, en cliquant sur le symbole correspondant.



3. Si nécessaire, changez l'orientation des empreintes optiques par rapport au pré-positionnement approximatif en cliquant sur les symboles de flèches ou sur les symboles de rotation dans l'espace **Orientation**.

4. Si nécessaire, inversez les côtés intérieur et extérieur des empreintes optiques en cliquant sur la représentation des empreintes optiques dans l'espace **Paramètres**.

5. Cliquez sur le bouton **OK**.

6. Si nécessaire, répétez les étapes pour un deuxième fichier STL. SICAT Function affecte automatiquement le deuxième fichier STL à l'autre mâchoire respective.

► SICAT Function affiche les empreintes optiques importées dans l'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques**.

7. Poursuivez avec l'enregistrement des empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone].

29.3 RÉUTILISER LES EMPREINTES OPTIQUES D'AUTRES APPLICATIONS SICAT



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.



Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.




L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** indique toujours les données patient et ignore le réglage **Anonymiser** afin que vous puissiez contrôler si les données de radiographie 3D et les empreintes optiques correspondent.

Vous trouverez des informations générales sur les empreintes optiques dans *Empreintes optiques* [► Page 158 - Standalone].

Procédez de la manière suivante pour réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.

- ☑ Vous avez déjà importé des empreinte optiques concernant l'étude ouverte dans une autre application SICAT et vous n'utilisez pas encore ces empreintes optiques dans SICAT Function.
1. Cliquez sur l'icône **Importer et recalcr les empreintes optiques**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** s'ouvre avec l'étape **Importer**.
 2. Cliquez dans la zone **Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT** sur la ligne représentant les empreintes optiques souhaitées.
 3. SICAT Function affiche les empreintes optiques sélectionnées :

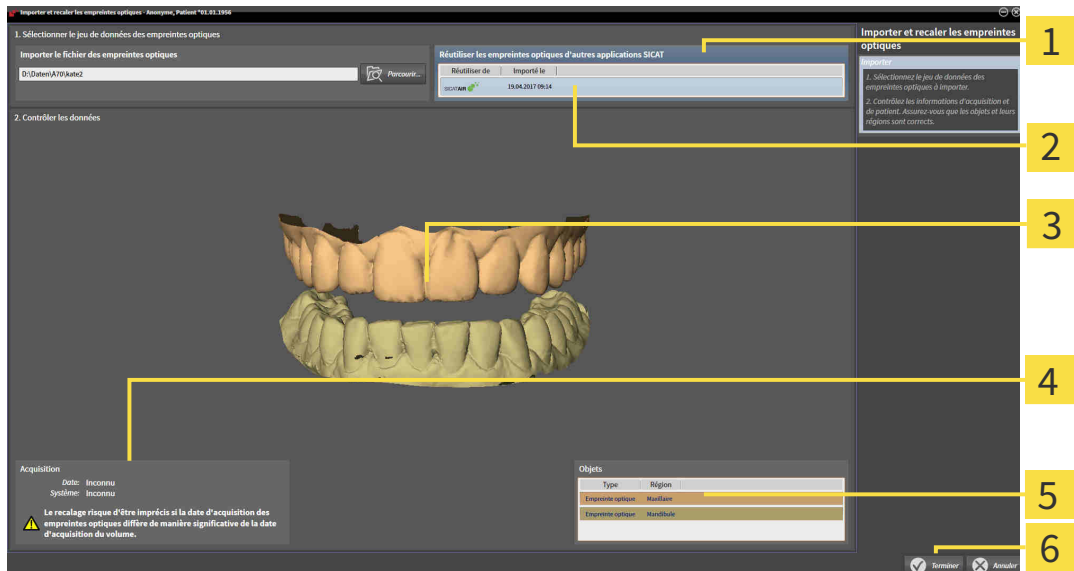

- | | |
|---|--|
| <p>1 Zone Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT</p> <p>2 Liste des empreintes optiques d'autres applications SICAT</p> <p>3 3DVue des empreintes optiques</p> | <p>4 Informations sur l'acquisition</p> <p>5 Liste d'objets</p> <p>6 Bouton Terminer</p> |
|---|--|

4. Vérifiez les informations relatives à l'acquisition et au patient. Assurez-vous que les objets et leurs régions sont corrects. La couleur de fond dans la liste d'objets correspond à la couleur des objets dans la vue **3D**.
5. Cliquez sur le bouton **Terminer**.
 - ▶ L'assistant **Importer et recalcr les empreintes optiques** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ajoute les empreintes optiques sélectionnées au **Navigateur d'objets**.
 - ▶ SICAT Function affiche les empreintes optiques sélectionnées.

Pour annuler la reprise d'empreintes optiques d'autres applications SICAT, vous pouvez cliquer sur **An-nuler**.

30 ARTICULATION ANATOMIQUE

SICAT Function visualise l'articulation anatomique d'un patient grâce au fusionnement, par le logiciel, des données de radiographie 3D et des données d'un appareil de mesure du mouvement de la mâchoire. C'est ce que l'on appelle articulation anatomique. Après avoir segmenté la mandibule, vous pouvez suivre tous les mouvements du patient jusque dans les articulations temporo-mandibulaires.

SICAT Function a besoin des données suivantes pour l'articulation anatomique :

- Données de radiographie 3D segmentées - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Segmentation* [► Page 152 - Standalone].
- Données recalées du mouvement de la mâchoire - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 145 - Standalone].

SICAT Function peut utiliser des empreintes optiques comme source d'informations supplémentaire. Les empreintes optiques vous permettent par exemple d'analyser les mouvements de la mâchoire d'un patient avant l'occlusion finale. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Empreintes optiques* [► Page 158 - Standalone].

Vous pouvez examiner les mouvements individuels d'un patient à l'aide des outils suivants :

- Espace JMT - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone]. Vous pouvez utiliser les boutons de lecture dans la zone JMT pour visionner le mouvement individuel de la mandibule d'un patient dans la vue **3D**. Un bouton de la zone JMT vous permet en outre d'exporter les données de mouvement de la mâchoire.
- **3DVue** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [► Page 121 - Standalone].
- **Fenêtre d'examen** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 117 - Standalone].


Pour analyser les mouvements individuels de la mandibule d'un patient, vous pouvez placer le réticule avec un double clic dans une vue de coupe 2D, à la position choisie sur la mandibule. SICAT Function affiche ensuite le tracé de mouvement correspondant à la position choisie dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [► Page 116 - Standalone].

Vous pouvez aussi placer la **Fenêtre d'examen** à la position choisie sur la mandibule. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Représentation de tracés de mouvements dans la vue 3D* [► Page 172 - Standalone].

Dans la vue **3D**, SICAT Function indique à l'aide de différentes couleurs si la position choisie se trouve sur la mandibule segmentée ou en dehors. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 173 - Standalone] et *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 174 - Standalone].

30.1 INTERAGIR AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE

La zone JMT est disponible dans SICAT Function pour la gestion des mouvements de la mâchoire :

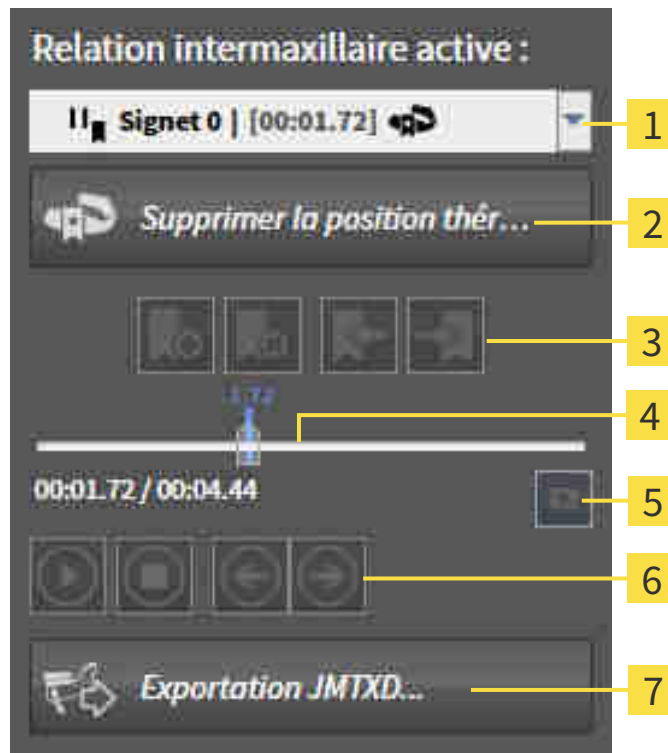

1 Liste **Relation intermaxillaire active**

2 Bouton **Position thérapeutique**

3 Boutons de signet

4 Axe du temps avec curseur

5 Symbole **Commuter le mode de lecture**

6 Boutons de lecture

7 Bouton **Exportation JMTXD**

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans la zone JMT :

- Sélectionner les relations intermaxillaires statiques ou les mouvements de la mâchoire.
- Interagir avec les mouvements de la mâchoire.
- Gérer les signets.
- Définir une position thérapeutique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [► Page 201 - Standalone].
- Exporter les données de mouvement de la mâchoire.

SÉLECTIONNER LES RELATIONS INTERMAXILLAIRES STATIQUES OU LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE.

Procédez de la manière suivante pour sélectionner une **Relation intermaxillaire statique** ou une **Relation intermaxillaire dynamique** :

1. Cliquez sur la liste **Relation intermaxillaire active** .

▶ La liste **Relation intermaxillaire active** s'ouvre.



2. Choisissez la **Relation intermaxillaire statique** ou la **Relation intermaxillaire dynamique** souhaitée.



▶ La liste **Relation intermaxillaire active** se ferme.

▶ La zone JMT affiche la désignation de la relation intermaxillaire sélectionnée.

▶ La vue **3D** représente la relation intermaxillaire sélectionnée.

INTERAGIR AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÂCHOIRE

Procédez de la manière suivante pour interagir avec les mouvements de la mâchoire :

- Les données de mouvement de la mâchoire ont déjà été importées. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [[Page 147 - Standalone](#)].



1. Pour démarrer la lecture, cliquez sur l'icône **Démarrer**.



2. Pour arrêter la lecture, cliquez sur l'icône **Arrêter**.



3. Pour sauter à la trame suivante, cliquez sur l'icône **En avant**.



4. Pour sauter à la trame précédente, cliquez sur l'icône **En arrière**.



5. Pour commuter le mode de lecture entre "une fois" et "en boucle", cliquez sur l'icône **Commuter le mode de lecture**.

6. Pour modifier manuellement la position sur l'axe du temps, cliquez sur le curseur dans la zone JMT, déplacez la souris et relâchez le bouton gauche de la souris à la position voulue.

GÉRER LES SIGNETS DANS LA ZONE JMT

Procédez de la manière suivante pour gérer les signets dans la zone JMT :



1. Pour ajouter un signet à la position actuelle sur l'axe du temps, cliquez sur l'icône **Ajouter un signet**.



2. Pour supprimer un signet à la position actuelle sur l'axe du temps, cliquez sur l'icône **Supprimer le signet**.



3. Pour déplacer le curseur à la position du signet suivant, cliquez sur l'icône **Signet suivant**.



4. Pour déplacer le curseur à la position du signet précédent, cliquez sur l'icône **Signet précédent**.

Dans les cas suivants, il n'est pas possible de supprimer un signet :

- Vous avez défini un signet sur une position thérapeutique pour laquelle une commande se trouve dans le panier. Pour supprimer le signet, terminez la commande ou supprimez-la.
- Vous avez sélectionné un signet en tant que relation intermaxillaire active. Pour supprimer le signet, sélectionnez le tracé de mouvement correspondant ou la relation intermaxillaire statique correspondante et cliquez sur l'icône **Signet suivant**.

EXPORTER LES DONNÉES DE MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE

Procédez de la manière suivante pour exporter les données de mouvement de la mâchoire :

- Vous avez déjà importé et recalé des données de mouvement de la mâchoire.
- Vous avez déjà importé et recalé des empreintes optiques du maxillaire et de la mandibule.



1. Cliquez sur le bouton **Exportation JMTXD**.
 - ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.
2. Sélectionnez un répertoire de destination et modifiez le nom du fichier si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - ▶ SICAT Function ferme la fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows.
 - ▶ SICAT Function exporte les données de mouvement de la mâchoire et les empreintes optiques dans le fichier spécifié (format de fichier JMTXD, compatibilité avec CEREC 4.4 et InLab15).



Vous pouvez exporter les données de mouvement de la mâchoire sous forme anonyme en activant auparavant l'anonymisation dans les réglages.

30.2 REPRÉSENTATION DE TRACÉS DE MOUVEMENTS DANS LA VUE 3D

Les tracés de mouvements représentent la trajectoire dans l'espace d'un point de la mandibule. Ils sont semblables à la représentation des systèmes de condylographie rapportée aux axes usuels. Le point dont la trajectoire est représentée est appelé point de tracé. Vous pouvez choisir librement des points de tracé dans SICAT Function. Vous pouvez sélectionner des mouvements individuels d'un patient dans la zone JMT et les examiner dans la vue **3D**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace JMT dans *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].

Pour représenter les tracés de mouvements dans la vue **3D**, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Recalez les données de mouvement de la mâchoire sur les données de radiographies 3D - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Données de mouvement* [► Page 145 - Standalone].
- Segmentez les données de radiographie 3D - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Segmentation* [► Page 152 - Standalone].

Une fois que vous avez importé les données de mouvement de la mâchoire et segmenté les données de radiographie 3D, la vue **3D** affiche d'abord les relations originelles de la radiographie 3D. Si vous sélectionnez un mouvement enregistré, la vue **3D** affiche les tracés de mouvements.

SICAT Function marque la position des tracés de mouvements à l'aide de différentes couleurs :

- Si les tracés de mouvement se trouvent sur la mandibule du patient, SICAT Function les repère en vert.
- Si les tracés de mouvement ne se trouvent pas sur la mandibule du patient, SICAT Function les repère en rouge.

Vous pouvez placer les tracés de mouvement sur la mandibule du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements avec la fenêtre d'examen* [► Page 173 - Standalone] et *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 174 - Standalone].

Vous pouvez sélectionner un type de représentation pour la vue **3D** et l'adapter à vos besoins. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adaptation de la vue 3D* [► Page 121 - Standalone].

Vous pouvez visualiser la relation entre trois points de tracé différents. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utilisation du triangle de Bonwill* [► Page 178 - Standalone].

Vous pouvez afficher et masquer la limite de la segmentation. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher la limite de la segmentation* [► Page 179 - Standalone].

Vous pouvez visualiser le mouvement autour du condyle. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [► Page 180 - Standalone].

30.3 ADAPTER LES TRACÉS DE MOUVEMENTS AVEC LA FENÊTRE D'EXAMEN

Pour utiliser la **Fenêtre d'examen** en vue d'analyser le mouvement individuel du patient en tout point de la mandibule, procédez de la manière suivante :

- ☑ L'espace de travail **Panorama** est déjà actif. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer d'espace de travail actif* [► Page 104 - Standalone].
 - ☑ La vue **Panorama** est déjà active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [► Page 110 - Standalone].
 - ☑ La **Fenêtre d'examen** est déjà affichée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher la fenêtre d'examen* [► Page 117 - Standalone].
- Déplacez la **Fenêtre d'examen** sur la région anatomique voulue :



- ▶ SICAT Function actualise la position des tracés de mouvement dans la vue **3D** en fonction de la position de la **Fenêtre d'examen**. Le point de tracé actuel se trouve sur le réticule de la fenêtre d'examen.
- ▶ Les tracés de mouvement se trouvent à la nouvelle position.

Si le point de tracé se trouve en dehors de la mandibule du patient, vous pouvez positionner les tracés de mouvement sur la mandibule du patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter les tracés de mouvements dans une vue de coupe à l'aide du réticule* [► Page 174 - Standalone].




Pour déplacer immédiatement la **Fenêtre d'examen** sur la région anatomique voulue, vous pouvez aussi effectuer un double-clic à la position voulue dans la vue **Panorama**.

30.4 ADAPTER LES TRACÉS DE MOUVEMENTS DANS UNE VUE DE COUPE À L'AIDE DU RÉTICULE

Pour utiliser les réticules en vue d'analyser le mouvement individuel du patient en tout point de la mandibule, procédez de la manière suivante :

- ☑ Les réticules sont affichés dans les vues de coupes 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 116 - Standalone].
- 1. Activez la vue de coupe 2D voulue. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Changer de vue active* [▶ Page 110 - Standalone].
- 2. Déplacez le réticule sur la région anatomique voulue. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer, masquer et afficher les réticules et les cadres* [▶ Page 116 - Standalone].

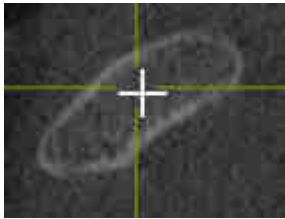

- ▶ SICAT Function actualise la position des tracés de mouvement dans la vue **3D** en fonction de la position du réticule.



Dans la vue **3D**, SICAT Function marque les tracés de mouvement en rouge lorsque vous choisissez une position située en dehors de la mandibule du patient.




Pour déplacer directement le réticule à la position du pointeur de la souris, vous pouvez également double-cliquer dans une vue 2D.

31 FONCTIONS DE L'ESPACE DE TRAVAIL TMJ

L'espace de travail **TMJ** vous assiste dans le diagnostic et la planification du traitement de dysfonctionnements craniomandibulaires. Dans l'espace de travail **TMJ**, vous pouvez comparer la morphologie et le mouvement des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite.

Dans l'espace de travail **TMJ**, vous pouvez afficher simultanément trois tracés différents pour chaque mouvement :

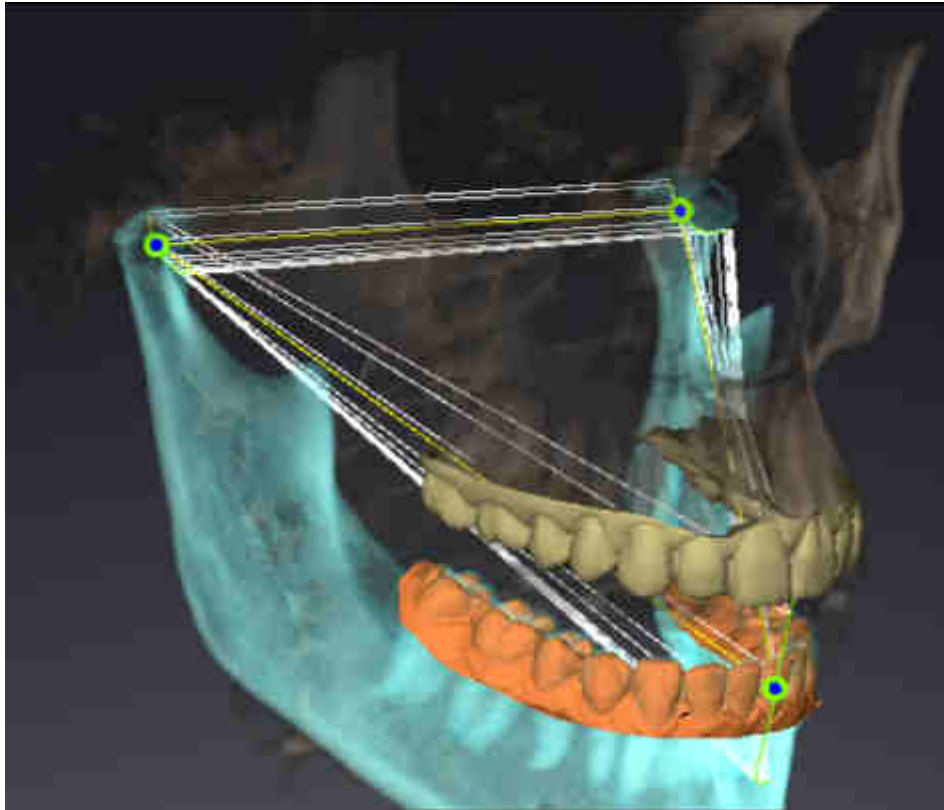

- Tracé pour le condyle gauche
- Tracé pour le condyle droit
- Tracé pour un point de l'occlusion, par exemple le point inter-incisif.

Vous pouvez déplacer les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Déplacer les points de tracé* [▶ Page 176 - Standalone].

Dans la vue **3D**, vous pouvez placer le point de tracé du point inter-incisif à l'aide d'un double clic. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Placer le point inter-incisif* [▶ Page 177 - Standalone].

L'espace de travail **TMJ** offre des options supplémentaires pour l'examen de l'articulation anatomique individuelle d'un patient. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Afficher la limite de la segmentation* [▶ Page 179 - Standalone], *Afficher le mouvement axé sur les condyles* [▶ Page 180 - Standalone] et *Utilisation du triangle de Bonwill* [▶ Page 178 - Standalone]. Vous pouvez également utiliser le triangle de Bonwill pour relever des valeurs de l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Valeurs d'articulateur* [▶ Page 181 - Standalone].

31.1 DÉPLACER LES POINTS DE TRACÉ

SICAT Function affiche simultanément les tracés des points correspondants du condyle gauche et du condyle droit. À l'aide de ces tracés, vous pouvez comparer le mouvement complet des articulations entre elles.


Procédez de la manière suivante pour déplacer les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe :

☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ** *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [▶ *Page 175 - Standalone*] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ *Page 101 - Standalone*].

☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.

1. Amenez le pointeur de la souris sur le point de tracé de votre choix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position du point de tracé voulue.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.


▶ SICAT Function déplace les points de tracé pour le condyle gauche et le condyle droit dans les vues de coupe sur la position sélectionnée :

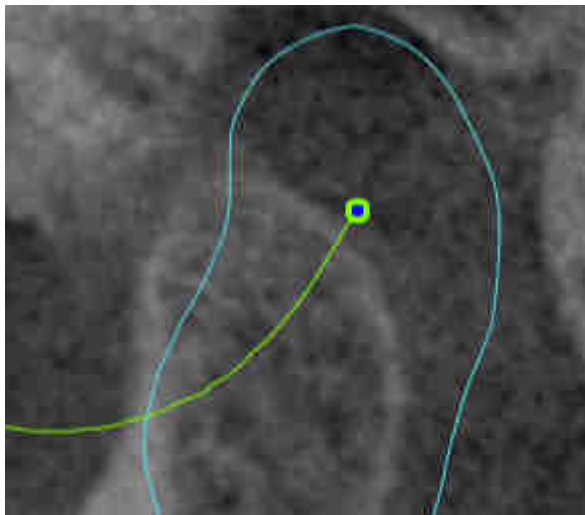

31.2 PLACER LE POINT INTER-INCISIF

Procédez de la manière suivante pour placer le point inter-incisif dans la vue **3D** :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [► Page 175 - Standalone] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 101 - Standalone].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.
 - Amenez le pointeur de la souris à la position voulue dans la vue **3D** puis double-cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function utilise la position sélectionnée sur les empreintes dentaires numériques comme point de tracé :

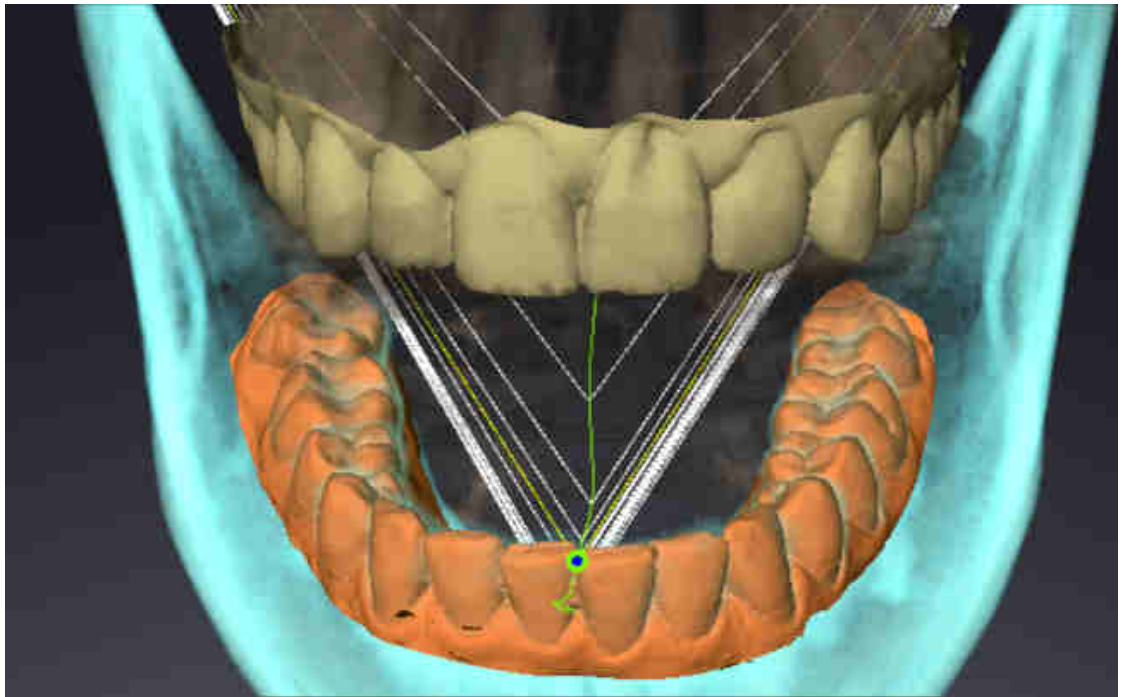

Avec une vue frontale sur le point inter-incisif, vous pouvez identifier et observer en détail les mouvements latéraux de la mandibule.


31.3 UTILISATION DU TRIANGLE DE BONWILL

AFFICHER LE TRIANGLE DE BONWILL

À l'aide du **Triangle de Bonwill**, SICAT Function visualise la relation entre les trois points de tracé. Ceci permet de détecter facilement les dissymétries et les discontinuités dans les mouvements.

Procédez de la manière suivante pour afficher le **Triangle de Bonwill** :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [► Page 175 - Standalone] et **Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ** [► Page 101 - Standalone].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique.
 - Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Données de mouvement**.
 - SICAT Function indique dans **Propriétés** la **Triangle de Bonwill** :

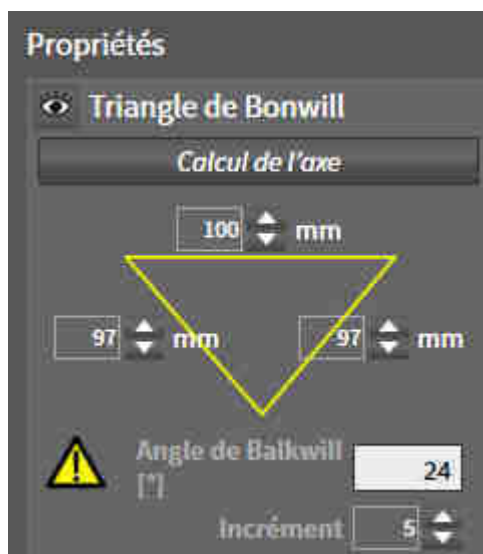

CONFIGURER LE TRIANGLE DE BONWILL

Procédez de la manière suivante pour régler l'incrément du triangle de Bonwill :

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Données de mouvement**.
2. Cliquez dans la zone **Propriétés** à côté de **Incrément** sur une des touches fléchées.
 - SICAT Function modifie la valeur du champ **Incrément**.
 - La vue **3D** représente l'incrément sélectionné du triangle de Bonwill.



Réglez l'incrément de manière à ce que d'éventuelles dissymétries du mouvement soient aisément détectables.

31.4 AFFICHER LA LIMITE DE LA SEGMENTATION

L'activation de la limite de la segmentation vous permet de comparer la qualité de la segmentation avec les radiographies 3D. Au cas où la limite de la segmentation s'écarte de la radiographie 3D, vous pouvez corriger la segmentation dans la fenêtre **Segmenter la mandibule et les condyles**.


Le contour bleu indique la position des condyles en fonction du mouvement actuel. Par conséquent, le contour bleu n'est généralement pas superposable aux radiographies 3D et ne convient pas au contrôle de la qualité de la segmentation. Utilisez plutôt le contour jaune pour vérifier la limite de la segmentation.

Procédez de la manière suivante pour afficher la limite de la segmentation :

- Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail **TMJ** dans *Fonctions de l'espace de travail TMJ* [► Page 175 - Standalone] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 101 - Standalone].
- Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique ou une relation intermaxillaire statique.

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Régions du volume**.

► SICAT Function affiche sous **Propriétés** l'option **Afficher la limite de la segmentation** :

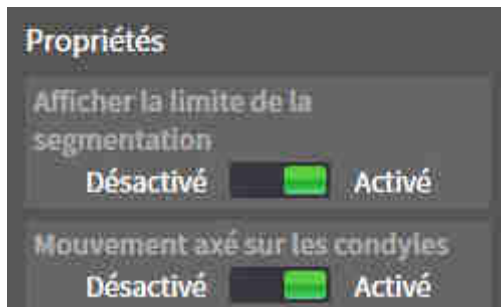

2. Déplacez le curseur de réglage de l'option **Afficher la limite de la segmentation** sur la position **Activé**.

► Les vues 2D affichent la limite de la segmentation avec un contour jaune.

SICAT Function marque la position segmentée de l'articulation à l'aide de différentes couleurs :

- SICAT Function repère les condyles en mouvement à la position segmentée en bleu.
- SICAT Function repère la segmentation originale des radiographies 3D par une ligne de contrôle. SICAT Function marque la ligne de contrôle en jaune.

31.5 AFFICHER LE MOUVEMENT AXÉ SUR LES CONDYLES


Le mouvement axé sur les condyles permet de visualiser les condyles en mouvement en relation avec les fosses. Lorsque le mouvement axé sur les condyles est activé, tous les points des condyles sont visibles pendant la totalité du mouvement dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**. Lorsque le mouvement axé sur les condyles est désactivé, tous les points des fosses sont visibles pendant la totalité du mouvement dans les vues de coupe de l'espace de travail **TMJ**.

Procédez de la manière suivante pour visualiser le mouvement axé sur les condyles :

- ☑ Vous avez déjà ouvert l'espace de travail **TMJ**. Vous trouverez des informations générales sur l'espace de travail dans **TMJ Fonctions de l'espace de travail TMJ** [► Page 175 - Standalone] et *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 101 - Standalone].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique ou une relation intermaxillaire statique.

1. Dans le **Navigateur d'objets**, cliquez sur **Régions du volume**.

► SICAT Function affiche sous **Propriétés** l'option **Mouvement axé sur les condyles** :

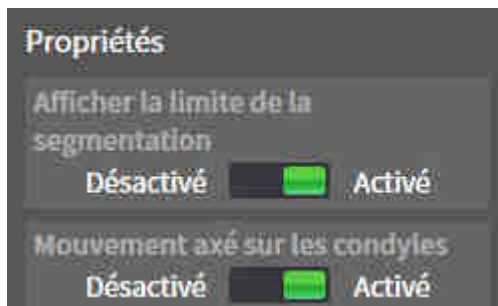

2. Déplacez le curseur de réglage de l'option **Mouvement axé sur les condyles** sur la position **Activé**.

► La vue **3D** représente le mouvement axé sur les condyles.

32 VALEURS D'ARTICULATEUR



Une mauvaise orientation du volume, une détermination erronée du point incisif peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. Assurez-vous que la radiographie 3D est alignée de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure soit parallèle aux coupes axiales.
2. Assurez-vous que vous ayez sélectionné une relation intermaxillaire dans laquelle les dents du patient sont en occlusion de sorte que les plans d'occlusion des mâchoires supérieure et inférieure correspondent.
3. Assurez-vous que le point incisif dans le logiciel repose sur le point incisif anatomique correct entre les incisives inférieures centrales.



Une définition insuffisamment précise du triangle de Bonwill peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. Assurez-vous que vous ayez la définition du triangle de Bonwill conformément aux repères anatomiques corrects.
2. Assurez-vous que la définition du triangle de Bonwill est adaptée à l'objectif prévu.



L'utilisation de données de mouvement de la mâchoire incorrectes peut entraîner le calcul erroné de l'axe charnière.

Utilisez exclusivement un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé pour le calcul de l'axe charnière.

SICAT Function vous aide à déterminer les valeurs d'articulateur propres au patient. Vous pouvez construire et fabriquer des restaurations individuelles en transmettant les valeurs à un articulateur. Actuellement, l'établissement des paramètres pour les articulateurs, qui utilisent le plan d'occlusion comme niveau de référence, est optimisé.

L'articulateur virtuel du logiciel CEREC (Dentsply Sirona) est un exemple d'articulateur qui utilise le plan d'occlusion comme niveau de référence. Les instructions de service de CEREC comprennent des informations sur la manière de programmer l'articulateur CEREC avec des valeurs individuelles.

APPAREIL DE MESURE DU MOUVEMENT DE LA MÂCHOIRE NÉCESSAIRE

Vous pouvez établir la plupart des valeurs d'articulateur à l'aide d'enregistrements de mouvements de mâchoires. Vous avez besoin d'enregistrements de mouvements de mâchoires d'un type déterminé pour établir des valeurs :

VALEUR D'ARTICULATEUR	ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS DE MÂCHOIRE NÉCESSAIRE
Inclinaison sagittale des voies d'articulation des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite.	Protrusion
Angles de Bennett gauche et droit ainsi que mouvements latéraux immédiats gauche et droit.	Latérotursions gauche et droite

VALEUR D'ARTICULATEUR	ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS DE MÂCHOIRE NÉCESSAIRE
Axe charnière	Mouvement d'ouverture réalisé ou mouvement de fermeture réalisé

VALEURS POUR L'ARTICULATEUR CEREC

Vous pouvez établir les valeurs suivantes pour l'articulateur CEREC avec SICAT Function.

PARAMÈTRES DE L'ARTICULATEUR CEREC	DESCRIPTION
Côté	Les côtés sont les distances du condyle gauche ou droit par rapport au point incisif entre les incisives inférieures centrales. SICAT Function indique les longueurs du côté directement sur le triangle de Bonwill.
Base	La base est la distance entre les condyles gauche et droit (distance intercondylienne). SICAT Function indique la longueur de la base directement sur le triangle de Bonwill.
Angle de Balkwill	L'angle de Balkwill est l'angle entre le plan d'occlusion et le triangle de Bonwill. SICAT Function indique l'angle de Balkwill directement sur le triangle Bonwill.
Inclinaison sagittale des voies d'articulation gauche et droite.	L'inclinaison sagittale des voies d'articulation est l'angle entre la trajectoire de protrusion du condyle gauche ou droit et le plan d'occlusion. Vous pouvez mesurer cet angle dans les vues sagittales de l'espace de travail TMJ à l'aide d'une trajectoire de protrusion. Ce faisant, assurez-vous que les données de radiographie 3D soient alignées horizontalement par rapport au plan d'occlusion de la mâchoire supérieure. À ce propos, observez absolument les consignes de sécurité concernant l'orientation du volume. Mesurez l'angle entre la trajectoire de protrusion des articulations temporo-mandibulaires gauche et droite ainsi que l'horizontale.
Angles de Bennett gauche et droit	L'angle de Bennett est l'angle entre le mouvement de protrusion et la latérotusion. Vous pouvez mesurer cet angle dans les vues axiales de l'espace de travail TMJ à l'aide d'une latérotusion sur les côtés gauche et droit. Ce faisant, assurez-vous que les radiographies 3D soient alignées horizontalement par rapport au plan d'occlusion de la mâchoire supérieure. À ce propos, observez absolument les consignes de sécurité concernant l'orientation du volume. Mesurez l'angle entre la trajectoire de latérotusion et le plan sagittal.

PARAMÈTRES DE L'ARTICULATEUR CEREC	DESCRIPTION
Mouvements latéraux immédiats gauche et droit	

VISIBILITÉ DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D

Vous pouvez évaluer les valeurs d'articulateur essentiellement à l'aide d'enregistrements de mouvements de mâchoires. Vous ne pouvez pas établir seulement la distance intercondylienne (longueur de « base » du triangle de Bonwill dans l'articulateur CEREC) à partir de données de mouvement de la mâchoire uniquement.

S'il n'est pas possible de voir les articulations temporo-mandibulaires sur la radiographie 3D, vous pouvez établir le côté de « base » du triangle de Bonwill à l'aide de l'axe charnière. Vous pouvez établir l'axe charnière à l'aide d'un mouvement d'ouverture ou un mouvement de fermeture réalisé. L'important à cet égard est que la mâchoire inférieure décrive un mouvement de rotation et ne se déplace pas vers l'avant.

Vous pouvez établir cependant la distance intercondylienne à l'aide de la radiographie 3D. Le tableau suivant indique de quelles données de mouvement de la mâchoire vous avez besoin pour quelle valeur d'articulateur :

	IL EST POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.	IL N'EST PAS POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.
Cause	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez utilisé un appareil de radiographie avec un grand champ de vision (FOV) pour la radiographie 3D. 	<p>Vous avez utilisé un appareil de radiographie avec un petit champ de vision (FOV) pour la radiographie 3D.</p> <p>Vous avez effectué une radiographie 3D d'un modèle en plâtre.</p>
Conséquence	Il est possible de placer le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au niveau des condyles sur la radiographie 3D.	Il n'est pas possible de placer le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au niveau des condyles sur la radiographie 3D.

	IL EST POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.	IL N'EST PAS POSSIBLE DE VOIR DES CONDYLES SUR LA RADIOGRAPHIE 3D.
Étapes nécessaires	Placez le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit dans les vues de coupe de l'espace de travail TMJ . Pour ce faire, orientez-vous selon la position des condyles sur la radiographie 3D.	L'enregistrement d'un mouvement d'ouverture réalisé et d'un mouvement de fermeture réalisé est nécessaire au calcul de l'axe de charnière. Un mouvement d'ouverture ou un mouvement de fermeture réalisé se caractérise en ce que le patient ouvre ou ferme la mâchoire de quelques millimètres et vous manipulez les condyles avec la prise de Lauritzen ou la prise de Dawson de telle sorte que la mâchoire inférieure ne se déplace pas vers l'avant. SICAT Function place le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de telle manière que les deux points de dépistage reposent automatiquement sur l'axe de charnière des articulations temporo-mandibulaires.

LE TRIANGLE DE BONWILL DANS SICAT FUNCTION

Le triangle de Bonwill dans SICAT Function vous aide à établir les valeurs d'articulateur suivantes :

- Côtés gauche et droite [mm]
- Base [mm]
- Angle de Balkwill [°]

La condition préalable à cet effet est que les trois points angulaires du triangle de Bonwill soient correctement placés.

- Point de dépistage gauche
- Point de dépistage droit
- Point incisif

Vous pouvez placer le point incisif dans la vue **3D** dans l'espace de travail **TMJ** en double-cliquant sur le point anatomique correct. Le placement que ce soit du point de dépistage gauche mais également du point de dépistage droit se différencie selon si les condyles sont visibles ou pas sur la radiographie 3D.


Pour savoir comment relever les valeurs d'articulateur, reportez-vous au paragraphe *Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles visibles* [► Page 185 - Standalone] ou *Relever des valeurs d'articulateur avec des condyles invisibles* [► Page 187 - Standalone].

32.1 RELEVER DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC DES CONDYLES VISIBLES


RÉGLAGE DU TRIANGLE DE BONWILL AVEC DES CONDYLES VISIBLES

Utilisez les vues de coupe pour les étapes suivantes dans l'espace de travail **TMJ** :

1. Cliquez sur le point de dépistage gauche ou le point de dépistage droit, maintenez enfoncée la touche gauche de la souris et placez le point de dépistage dans le condyle respectif.
2. Placez le point incisif entre les incisives inférieures après avoir double-cliqué sur la position anatomique correcte. Si vous ne pouvez voir aucun point incisif entre les incisives inférieures, sélectionnez un mouvement d'ouverture et ouvrez légèrement la mâchoire. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].

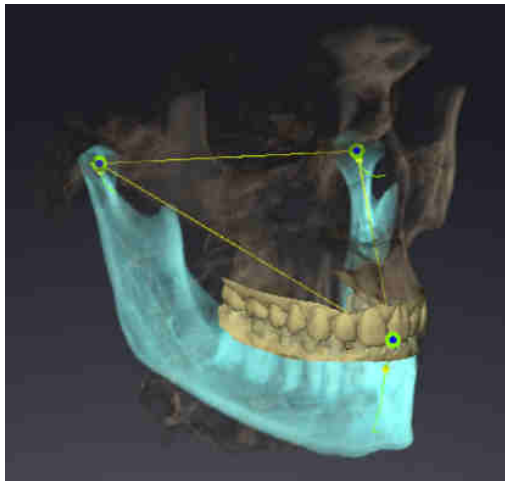

La capture d'écran montre une radiographie 3D avec un grand champ de vision (FOV) dans lequel un triangle de Bonwill est aligné sur l'anatomie du patient. Les condyles sont visibles. Le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit sont placés au centre des condyles visibles. Le point incisif dans SICAT Function est placé entre les incisives inférieures.

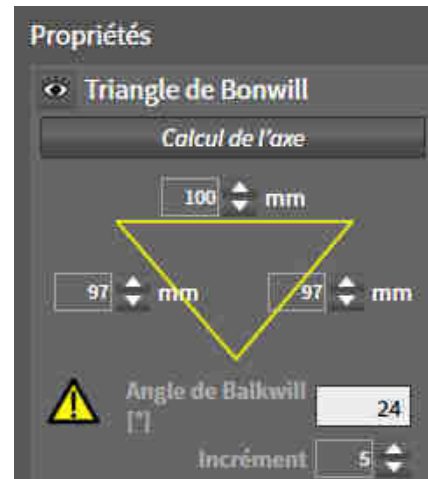

SICAT Function indique les longueurs en mm des côtés du triangle de Bonwill. Vous pouvez noter directement les valeurs de l'articulateur. SICAT Function indique également l'angle de Balkwill. L'angle de Balkwill est valable uniquement pour les mâchoires fermées.

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC CONDYLES VISIBLES

Procédez de la manière suivante pour établir les valeurs d'articulateur :

- ☑ Vous avez disposé la radiographie 3D de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure est orienté horizontalement et les mâchoires sont pratiquement symétriques par rapport au plan sagittal médian. Ces alignements corrects sont nécessaires afin que vous puissiez saisir correctement les données et les transmettre dans l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [► Page 135 - Standalone].
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Données de mouvement* [► Page 145 - Standalone].


- ☑ L'espace de travail **TMJ** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [► Page 101 - Standalone].
 - ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique dans la liste **Relation intermaxillaire active**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].
1. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - ▶ SICAT Function indique le triangle de Bonwill dans l'espace **Propriétés**.
 2. Mettez le point incisif dans la vue **3D** entre les incisives inférieures en double-cliquant sur la position anatomique correcte sur la mâchoire inférieure segmentée ou sur les empreintes optiques. Si le point incisif des incisives inférieures est caché, ouvrez les mâchoires en visionnant le mouvement jusqu'à ce que les incisives inférieures soient visibles. Placez le point incisif en double-cliquant puis refermez les mâchoires.
 3. Mettez le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit au centre des condyles en déplaçant les points de dépistage dans les vues coronales, sagittales et axiales.
 4. Assurez-vous que les longueurs des côtés sont symétriques.
 5. Notez les valeurs de base, de côtés (cette valeur est identique des deux côtés) et de l'angle de Balkwill.
 6. Sélectionnez pendant le mouvement de protrusion sélectionné un instant pendant lequel les mâchoires sont fermées. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].
 7. Assurez-vous que les rangées de dents sont fermées.
 8. Mesurez la pente condylienne avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche et l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues sagittales. Notez les valeurs.
 9. Sélectionnez la latérotusion vers la gauche. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues axiales. Notez la valeur.
 10. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.
 11. Sélectionnez la latérotusion vers la droite. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche dans les vues axiales. Notez la valeur.
 12. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.

32.2 RELEVER DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC DES CONDYLES INVISIBLES


RÉGLAGE DU TRIANGLE DE BONWILL AVEC DES CONDYLES INVISIBLES

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé dans la liste **Relation intermaxillaire active**.
2. Cliquez sur le bouton **Calcul de l'axe**.
 - ▶ SICAT Function montre l'axe calculé sous forme d'une ligne pointillée dans la vue **3D**. SICAT Function place automatiquement le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de manière à ce que les deux points de dépistage se trouvent sur l'axe de charnière calculé dans l'espace de travail **TMJ**.
 - ▶ Si vous sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**, SICAT Function affiche l'axe calculé dans la zone **Propriétés**.

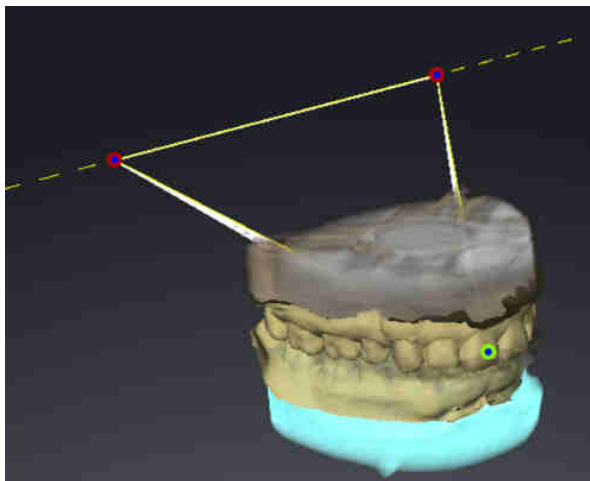

La capture d'écran montre en exemple un scan de modèle en plâtre sur lequel les condyles ne sont pas visibles. L'axe de charnière a été établi à partir d'un mouvement d'ouverture réalisé. La ligne en pointillé esquisse l'axe calculé. SICAT Function a placé automatiquement le point de dépistage gauche et le point de dépistage droit de telle manière que les deux points de dépistage se trouvent sur l'axe calculé. Le point incisif dans SICAT Function est placé entre les incisives inférieures.

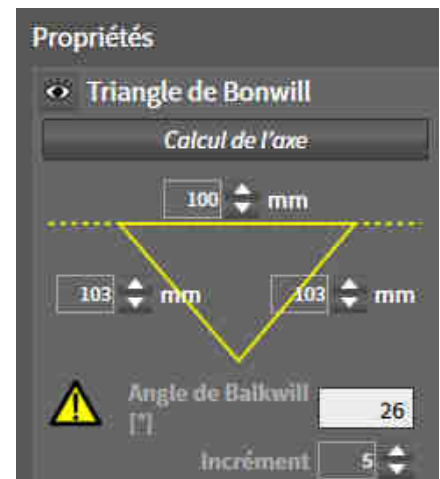

SICAT Function indique les longueurs en mm des côtés du triangle de Bonwill. Vous pouvez noter directement les valeurs de l'articulateur. SICAT Function indique également l'angle de Balkwill. L'angle de Balkwill est valable uniquement pour les mâchoires fermées.

ÉTABLISSEMENT DES VALEURS D'ARTICULATEUR AVEC CONDYLES INVISIBLES

Procédez de la manière suivante pour établir les valeurs d'articulateur :

- ☑ Vous avez disposé la radiographie 3D de telle manière que le plan d'occlusion de la mâchoire supérieure est orienté horizontalement et les mâchoires sont pratiquement symétriques par rapport au plan sagittal médian. Ces alignements corrects sont nécessaires afin que vous puissiez saisir correctement les données et les transmettre dans l'articulateur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Orientation du volume et zone panoramique* [▶ Page 135 - Standalone].
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Données de mouvement* [▶ Page 145 - Standalone].
- ☑ L'espace de travail **TMJ** est déjà ouvert. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Vue d'ensemble de l'espace de travail TMJ* [▶ Page 101 - Standalone].
- ☑ Vous avez déjà sélectionné une relation intermaxillaire dynamique dans la liste **Relation intermaxillaire active** . Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 169 - Standalone].

1. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - ▶ SICAT Function indique le triangle de Bonwill dans l'espace **Propriétés**.
2. Mettez le point incisif dans la vue **3D** entre les incisives inférieures en double-cliquant sur la position anatomique correcte sur la mâchoire inférieure segmentée ou sur les empreintes optiques. Si le point incisif des incisives inférieures est caché, ouvrez les mâchoires en visionnant le mouvement jusqu'à ce que les incisives inférieures soient visibles. Placez le point incisif en double-cliquant puis refermez les mâchoires.
3. Sélectionnez un mouvement d'ouverture réalisé ou un mouvement de fermeture réalisé dans la liste **Relation intermaxillaire active** .
4. Dans la zone **Propriétés**, cliquez sur le bouton **Calcul de l'axe**. Si nécessaire, fixez la longueur de la base sur la valeur moyenne de 100 mm.
5. Assurez-vous que les longueurs des côtés sont symétriques.
6. Sélectionnez dans **Navigateur d'objets** l'objet **Données de mouvement**.
 - ▶ SICAT Function indique les valeurs pour la base, les côtés et l'angle de Balkwill dans la zone **Propriétés**.
7. Notez les valeurs de base, de côtés (les deux valeurs gauche et droite doivent être identiques pour la programmation de l'articulateur) et de l'angle de Balkwill.
8. Sélectionnez un mouvement de protrusion. Sélectionnez pendant le mouvement de protrusion un instant pendant lequel les mâchoires sont fermées. Des informations concernant la manière de sélectionner une position déterminée dans un enregistrement de mouvement de mâchoire se trouvent au paragraphe *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [▶ Page 169 - Standalone].
9. Assurez-vous que les rangées de dents sont fermées.
10. Mesurez la pente condylienne avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche et l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues sagittales. Notez les valeurs.

11. Sélectionnez la latérotusion vers la gauche. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire droite dans les vues axiales. Notez la valeur.
12. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire droite. Notez la valeur.
13. Sélectionnez la latérotusion vers la droite. Mesurez l'angle de Bennett avec l'outil **Ajouter une mesure d'angle (A)** dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche dans les vues axiales. Notez la valeur.
14. Notez les mouvements latéraux immédiats si présents dans l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Notez la valeur.

33 MESURES DE DISTANCES ET D'ANGLES

Deux types de mesure sont disponibles dans SICAT Function :



- Mesures de distances



- Mesures d'angles

Les outils dédiés aux mesures sont disponibles dans l'étape **Diagnostiquer** de la **Barre d'outils de flux de travail**. Vous pouvez ajouter des mesures dans toutes les vues de coupes 2D. Chaque fois que vous ajoutez une mesure, SICAT Function l'ajoute aussi au groupe **Mesures** dans le **Navigateur d'objets**.




Vous ne pouvez pas ajouter d'objets de mesure dans la **Fenêtre d'examen**.

Les actions suivantes sont disponibles pour les mesures :

- *Ajouter des mesures de distances* [► Page 191 - Standalone]
- *Ajouter des mesures d'angles* [► Page 192 - Standalone]
- *Déplacer des mesures, des points de mesure et des valeurs de mesure* [► Page 194 - Standalone]
- Activer, masquer et afficher des mesures - vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone].
- Focaliser, supprimer les mesures, annuler et répéter les manipulations des mesures - Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 95 - Standalone].

33.1 AJOUTER DES MESURES DE DISTANCES

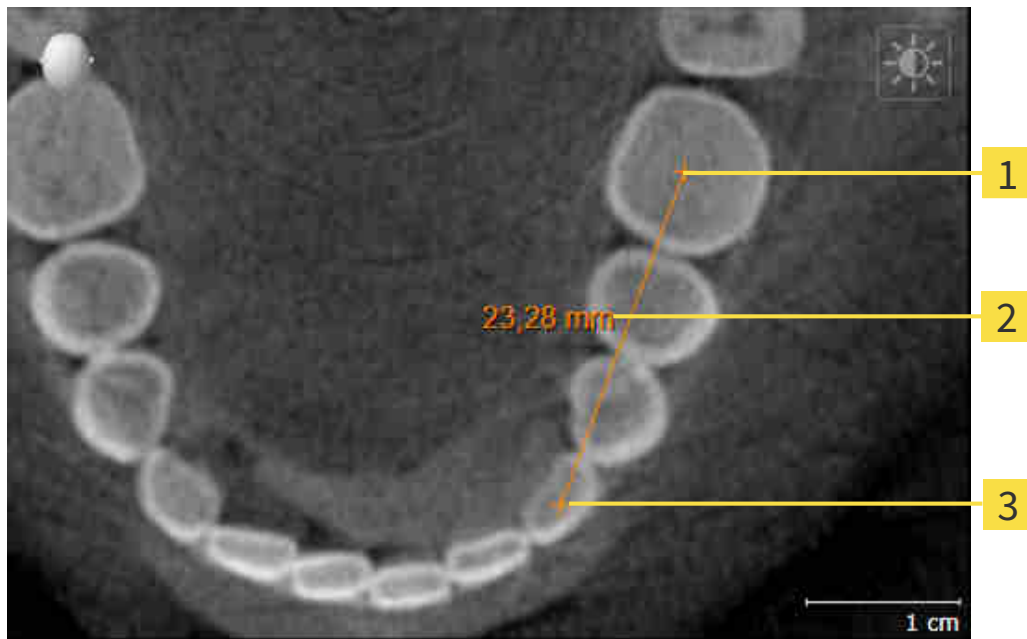

1 Point initial

2 Valeur de mesure

3 Point final

Procédez de la manière suivante pour ajouter une mesure de distance :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.




1. Cliquez dans l'étape de travail **Diagnostiquer** sur l'icône **Ajouter une mesure de distance (D)**.
 - ▶ SICAT Function ajoute une nouvelle mesure de distance au **Navigateur d'objets**.
2. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
3. Cliquez sur le point initial de la mesure de distance.
 - ▶ SICAT Function représente le point initial par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function affiche une ligne de distance entre le point initial et le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function visualise la distance actuelle séparant le point initial du pointeur de la souris au milieu de la ligne de distance ainsi que dans le **Navigateur d'objets**.
4. Amenez le pointeur de la souris sur le point final de la mesure de distance puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente le point final par une petite croix.



Vous pouvez à tout moment annuler l'ajout de mesures en appuyant sur **Échap**.

33.2 AJOUTER DES MESURES D'ANGLES

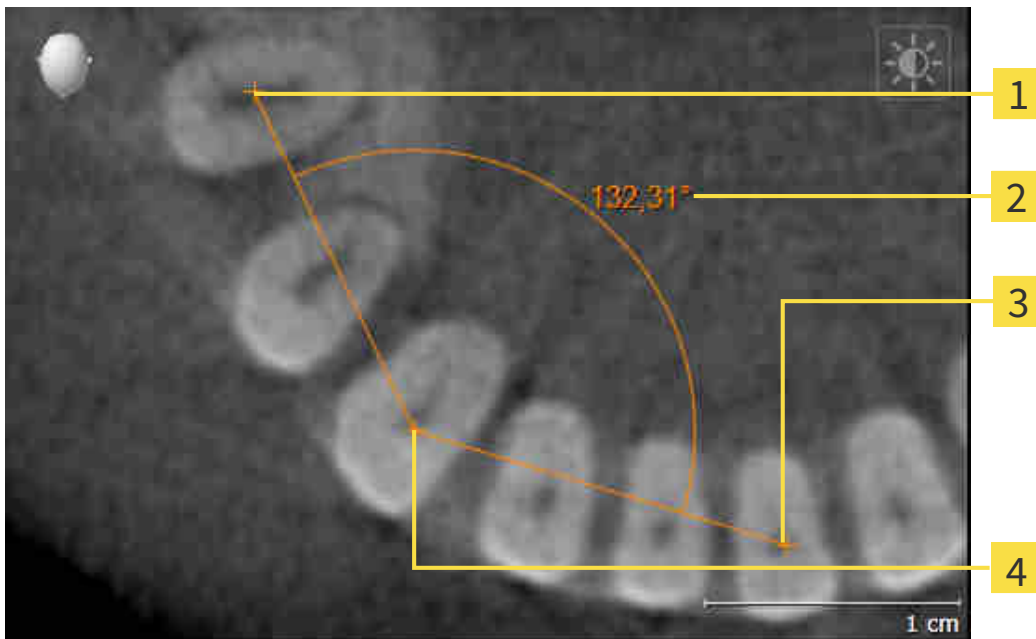

- 1** Point initial
- 2** Valeur de mesure
- 3** Point final
- 4** Sommet

Procédez de la manière suivante pour ajouter une mesure d'angle :

- L'étape de flux de travail **Diagnostiquer** est déjà développée.



1. Cliquez dans l'étape de travail **Diagnostiquer** sur l'icône **Ajouter une mesure d'angle (A)**.
 - ▶ SICAT Function ajoute une nouvelle mesure d'angle au **Navigateur d'objets**.
2. Amenez le pointeur de la souris sur la vue de coupe 2D de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
3. Cliquez sur le point initial de la mesure d'angle.
 - ▶ SICAT Function représente le point initial par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function représente le premier côté de la mesure d'angle par une ligne entre le point initial et le pointeur de la souris.
4. Amenez le pointeur de la souris sur le sommet de l'angle à mesurer puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function représente le sommet par une petite croix.
 - ▶ SICAT Function représente le deuxième côté de la mesure d'angle par une ligne entre le sommet de l'angle et le pointeur de la souris.
 - ▶ SICAT Function visualise l'angle actuel entre les deux côtés de la mesure d'angle ainsi que dans le **Navigateur d'objets**.

5. Amenez le pointeur de la souris sur le point final du deuxième côté de l'angle puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.

► SICAT Function représente le point final par une petite croix.



Vous pouvez à tout moment annuler l'ajout de mesures en appuyant sur **Échap**.

33.3 DÉPLACER DES MESURES, DES POINTS DE MESURE ET DES VALEURS DE MESURE

DÉPLACER DES MESURES

Procédez de la manière suivante pour déplacer une mesure :

☑ SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 95 - Standalone].

1. Amenez le pointeur de la souris sur une ligne de la mesure.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position de la mesure voulue.
 - La mesure suit le déplacement de la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle de la mesure.

DÉPLACER DES POINTS DE MESURE INDIVIDUELS

Procédez de la manière suivante pour déplacer un point de mesure individuel :

☑ SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [► Page 93 - Standalone] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [► Page 95 - Standalone].

1. Amenez le pointeur de la souris sur le point de mesure de votre choix.
 - Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position du point de mesure voulue.
 - Le point de mesure suit le déplacement de la souris.
 - La valeur de mesure change à mesure que vous déplacez la souris.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - SICAT Function conserve la position actuelle du point de mesure.

DÉPLACER DES VALEURS DE MESURE

Procédez de la manière suivante pour déplacer une valeur de mesure :

☑ SICAT Function affiche déjà la mesure voulue dans une vue de coupe 2D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Gestion des objets à l'aide du navigateur d'objets* [▶ Page 93 - Standalone] et *Gestion des objets à l'aide de la barre d'outils d'objet* [▶ Page 95 - Standalone].

1. Amenez le pointeur de la souris sur la valeur de mesure de votre choix.
 - ▶ Le pointeur de la souris prend l'apparence d'une croix.
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
3. Amenez le pointeur de la souris sur la position de la valeur de mesure voulue.
 - ▶ La valeur de mesure suit le déplacement de la souris.
 - ▶ SICAT Function affiche une ligne pointillée entre la valeur de mesure et la mesure correspondante.
4. Relâchez le bouton gauche de la souris.
 - ▶ SICAT Function conserve la position actuelle du point de mesure.



Une fois que la valeur d'une mesure a été déplacée, SICAT Function attribue une position absolue à la valeur de mesure. Pour restaurer la position relative de la valeur de mesure, vous pouvez double-cliquer sur la valeur.

34 EXPORTATION DE DONNÉES

Vous pouvez exporter des données.

Vous pouvez exporter les études du dossier patient actuellement ouvert.

SICAT Suite peut exporter les données suivantes :

- Dossiers patient (DICOM)
- Études 3D
- Documents

Les données exportées peuvent contenir les éléments suivants :

TYPE DE DONNÉES	FORMAT D'EXPORTATION
Radiographies 3D	DICOM
Études 3D	Propriétaire de SICAT
Document	PDF

SICAT Suite exporte des radiographies 3D et des études dans des archives ZIP ou des répertoires DICOM. Si nécessaire, SICAT Suite peut anonymiser les données patient pour l'exportation.



Pour exporter des documents, vous pouvez sélectionner des documents dans la zone **Radiographies 3D et projets de planification** puis cliquer sur le bouton **Transmettre**. Une fenêtre de l'explorateur des fichiers Windows s'ouvre ensuite, dans laquelle vous pouvez choisir un répertoire cible.

Pour exporter des données, effectuez les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

- Ouvrez la fenêtre **Transmettre les données**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"* [▶ Page 197 - Standalone].
- Exportez les données voulues. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Exporter des données* [▶ Page 198 - Standalone].

34.1 OUVRIR LA FENÊTRE "TRANSMETTRE LES DONNÉES"

vous devez tout d'abord ouvrir la fenêtre **Transmettre les données** afin d'exporter des données.

Pour ouvrir la fenêtre **Transmettre les données** dans la version standalone de SICAT Suite, effectuez une des actions suivantes :



- Lorsqu'un dossier patient est ouvert, cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Transmettre les données**.
 - ▶ La fenêtre **Transmettre les données** s'ouvre.
- Dans la fenêtre **SICAT Suite Home**, cliquez sur le bouton **Transmettre les données**.
 - ▶ La fenêtre **Transmettre les données** s'ouvre.
- Dans la fenêtre **Dossier patient actif**, sélectionnez une radiographie 3D, une étude ou un projet de planification puis cliquez sur le bouton **Transmettre les données**.
 - ▶ SICAT Suite active le dossier patient et ouvre la fenêtre **Transmettre les données** pour les données sélectionnées.
- Dans la fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient**, sélectionnez un dossier patient puis cliquez sur le bouton de transmission du patient sélectionné.
 - ▶ SICAT Suite active le dossier patient et ouvre la fenêtre **Transmettre les données**. Toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification du dossier patient sont sélectionnés pour l'exportation.
- Dans la fenêtre **Vue d'ensemble des dossiers patient**, sélectionnez une radiographie 3D, une étude ou un projet de planification puis cliquez sur le bouton **Transmettre les données**.
 - ▶ SICAT Suite active le dossier patient et ouvre la fenêtre **Transmettre les données**.




SICAT Suite exporte exclusivement les radiographies 3D et les projets de planification sélectionnés dans le dossier patient actif.

poursuivez avec *Exporter des données* [▶ Page 198 - Standalone].

34.2 EXPORTER DES DONNÉES

Procédez de la manière suivante pour exporter des études :

- ☑ La fenêtre **Transmettre les données** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"* [▶ Page 197 - Standalone].

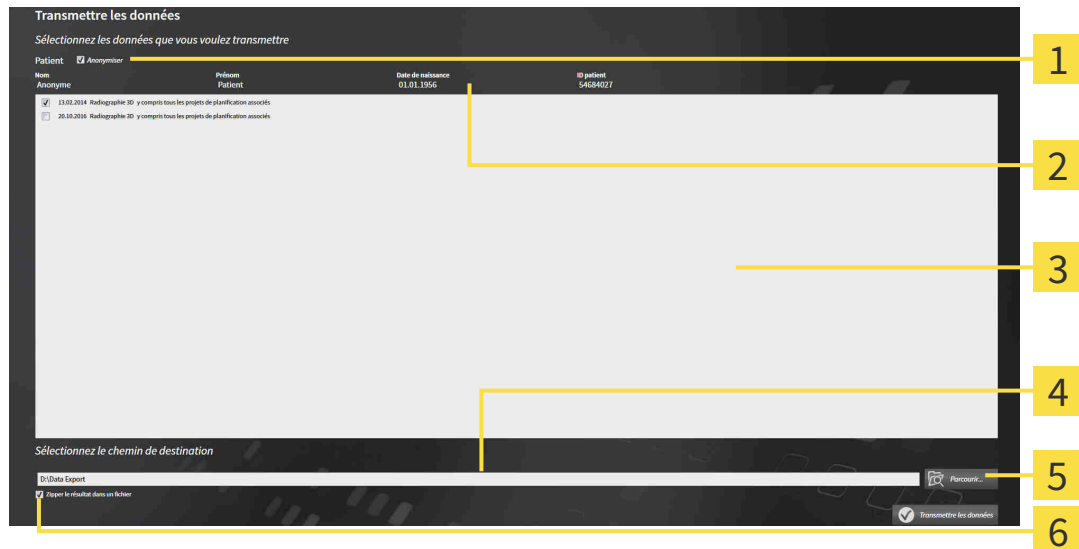

- | | |
|--|--|
| 1 Case à cocher Anonymiser | 4 Champ Sélectionnez le chemin de destination |
| 2 Attributs du dossier patient | 5 Bouton Transmettre les données |
| 3 Liste des études 3D | 6 Case à cocher Zipper le résultat dans un fichier |

- Si vous le souhaitez, activez la case à cocher **Anonymiser** dans la fenêtre **Transmettre les données**.
 - ▶ Les attributs du dossier patient exporté sont modifiés en **Patient** pour le **NomAnonyme** pour le **Prénom** et **01.01.** suivi de l'année de naissance pour **Date de naissance**. Les attributs du dossier patient dans le dépôt de dossiers patient restent inchangés.

- Assurez-vous que vous avez bien sélectionné les études 3D voulues du patient voulu.



- Cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - ▶ La fenêtre **Rechercher un dossier** s'ouvre.
- Dans la fenêtre **Rechercher un dossier**, sélectionnez un dossier cible et cliquez sur **OK**.
 - ▶ La fenêtre **Rechercher un dossier** se ferme et SICAT Suite reporte le chemin du dossier voulu dans le champ **Sélectionnez le chemin de destination**.

- Cochez ou décochez la case **Zipper le résultat dans un fichier**.



- Cliquez sur le bouton **Transmettre les données**.
 - ▶ SICAT Suite exporte les études sélectionnées dans un fichier ZIP ou dans le dossier sélectionné.

Les fichiers ZIP ainsi que le dossier contiennent les radiographies 3D au format DICOM et les données de planification au format de fichier propriétaire. Vous pouvez visualiser les radiographies 3D à l'aide de n'importe quel Viewer DICOM, et les données de planification à l'aide de l'application SICAT correspondante.

35 PROCESSUS DE COMMANDE

Procédez de la manière suivante pour commander le produit souhaité :

- Dans SICAT Function, définissez une position thérapeutique et insérez les données de planification de gouttières thérapeutiques souhaitées dans le panier. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [▶ Page 201 - Standalone] et *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [▶ Page 203 - Standalone].
- Contrôlez le panier et lancez la commande. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 208 - Standalone].
- Terminez la commande soit directement sur l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite, soit sur un autre ordinateur doté d'une connexion Internet active. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Terminer une commande via une connexion Internet active* [▶ Page 209 - Standalone] ou *Terminer une commande sans connexion Internet active* [▶ Page 213 - Standalone].



Vous pouvez ajouter au panier des commandes qui correspondent à différents patients, différentes radiographies 3D et différentes applications. Le contenu du panier est conservé lorsque vous fermez SICAT Suite.

35.1 DÉFINIR UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour définir une position thérapeutique :

- Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 147 - Standalone].
 - Vous avez déjà importé des empreintes optiques. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone] et *Réutiliser les empreintes optiques d'autres applications SICAT* [► Page 166 - Standalone].
1. Si vous souhaitez définir une position thérapeutique sur la base d'une relation intermaxillaire statique, sélectionnez une relation intermaxillaire statique dans la liste **Relation intermaxillaire active**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].
 2. Si vous souhaitez définir une position thérapeutique sur la base d'un mouvement de la mâchoire, sélectionnez un mouvement de la mâchoire dans la liste **Relation intermaxillaire active** et sautez à la position souhaitée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Interagir avec les mouvements de la mâchoire* [► Page 169 - Standalone].



3. Cliquez sur le bouton **Position thérapeutique**.
 - ▶ Si vous avez sélectionné une position thérapeutique basée sur un mouvement de la mâchoire, SICAT Function place un signet à la position correspondante.
 - ▶ Le bouton **Position thérapeutique** se change en bouton **Supprimer la position thérapeutique**.
 - ▶ SICAT Function enregistre la position thérapeutique sélectionnée pour la commande d'une gouttière thérapeutique.

SUPPRIMER UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour supprimer une position thérapeutique définie :

- Vous avez sélectionné la relation intermaxillaire statique ou le signet d'un mouvement de la mâchoire sur laquelle ou lequel est basée la position thérapeutique définie.



1. Cliquez sur le bouton **Supprimer la position thérapeutique**.
 - ▶ SICAT Function ouvre une fenêtre de notification affichant le message suivant : **Voulez-vous vraiment supprimer la position thérapeutique**
2. Si vous voulez réellement supprimer la position thérapeutique, cliquez sur **Poursuivre**.

ÉCRASER UNE POSITION THÉRAPEUTIQUE

Procédez de la manière suivante pour écraser une position thérapeutique définie :

Vous avez déjà défini une position thérapeutique.

1. Sélectionnez une relation intermaxillaire statique ou une position d'un mouvement de la mâchoire qui ne correspond pas à la position thérapeutique définie.



2. Cliquez sur le bouton **Position thérapeutique**.

► SICAT Function ouvre une fenêtre de notification affichant le message suivant : **Une position thérapeutique a déjà été définie. Si vous poursuivez, la position sera écrasée**

3. Cliquez sur **Poursuivre** si vous voulez réellement écraser la position thérapeutique.

poursuivez avec *Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier* [► Page 203 - Standalone].

35.2 AJOUTER DES GOUTTIÈRES THÉRAPEUTIQUES AU PANIER



ATTENTION

Des données de commande incorrectes peuvent entraîner une commande erronée.

Lorsque vous procédez à une commande, assurez-vous que vous sélectionnez et transmettez les données correctes pour cette commande.



ATTENTION

Une commande erronée peut entraîner un traitement erroné.

1. Vérifiez votre commande avant de l'envoyer.
2. Confirmez la planification correcte de votre commande.

Vous trouverez des informations générales sur le processus de commande dans *Processus de commande* [► Page 200 - Standalone].

Dans SICAT Function, la première partie du processus de commande consiste à insérer une gouttière thérapeutique dans le panier. Pour pouvoir insérer une gouttière thérapeutique dans le panier, vous devez remplir certaines conditions préalables. Si vous n'avez pas rempli toutes les conditions nécessaires, SICAT Function vous en informe.


SI LES CONDITIONS REQUISES NE SONT PAS REMPLIES

- L'étape de flux de travail **Commander** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 90 - Standalone].



1. Cliquez sur l'icône **Commander la gouttière thérapeutique**.

► La fenêtre **Commande incomplète** s'ouvre :

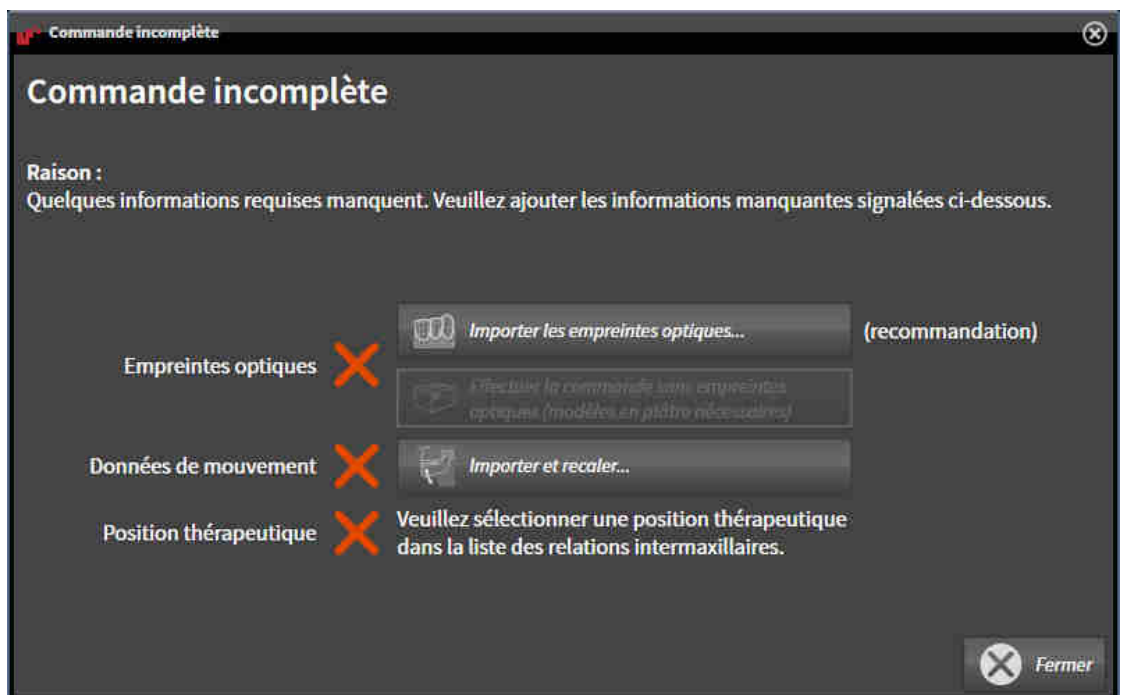



2. Si vous n'avez pas encore importé d'empreintes optiques, cliquez sur le bouton **Importer et recalcr** et importez les empreintes optiques correspondant à la radiographie 3D. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr les empreintes optiques* [► Page 159 - Standalone].



3. Si vous n'avez pas encore importé de données de mouvement de la mâchoire, cliquez sur le bouton **Importer et recalcr** et importez des données de mouvement de la mâchoire. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Importer et recalcr des données de mouvement de la mâchoire d'appareils dédiés* [► Page 147 - Standalone].
4. Si vous n'avez pas encore défini de position thérapeutique, fermez la fenêtre **Commande incomplète** et définissez une position thérapeutique. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Définir une position thérapeutique* [► Page 201 - Standalone].



Il est possible que vous deviez adapter l'orientation du volume et la courbe panoramique avant d'importer les empreintes optiques. Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** directement depuis la fenêtre **Importer et recalcr les empreintes optiques** à l'étape **Enregistrer** en cliquant sur le bouton **Adapter la zone panoramique**. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Adapter la zone panoramique* [► Page 142 - Standalone].



Si vous souhaitez envoyer à SICAT des modèles en plâtre plutôt que des empreintes optiques, vous pouvez également ajouter des gouttières thérapeutiques sans empreintes optiques au panier, en cliquant sur le bouton **Effectuer la commande sans empreintes optiques (modèles en plâtre nécessaires)** dans la fenêtre **Commande incomplète**. L'étape **Commander une gouttière thérapeutique** affiche alors l'information **Cette commande ne contient pas d'empreintes optiques. Veuillez envoyer les modèles en plâtre correspondants à SICAT.**

SI LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES


- ☑ Vous avez déjà importé des empreintes optiques.
- ☑ Vous avez déjà importé des données de mouvement de la mâchoire.
- ☑ Vous avez déjà défini une position thérapeutique.
- ☑ L'étape de flux de travail **Commander** est déjà développée. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Barre d'outils de flux de travail* [► Page 90 - Standalone].



- Cliquez sur l'icône **Commander la gouttière thérapeutique**.
- ▶ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** s'ouvre.

VÉRIFIEZ VOTRE COMMANDE DANS LA FENÊTRE "COMMANDER UNE GOUTTIÈRE THÉRAPEUTIQUE"

- La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** est déjà ouverte :

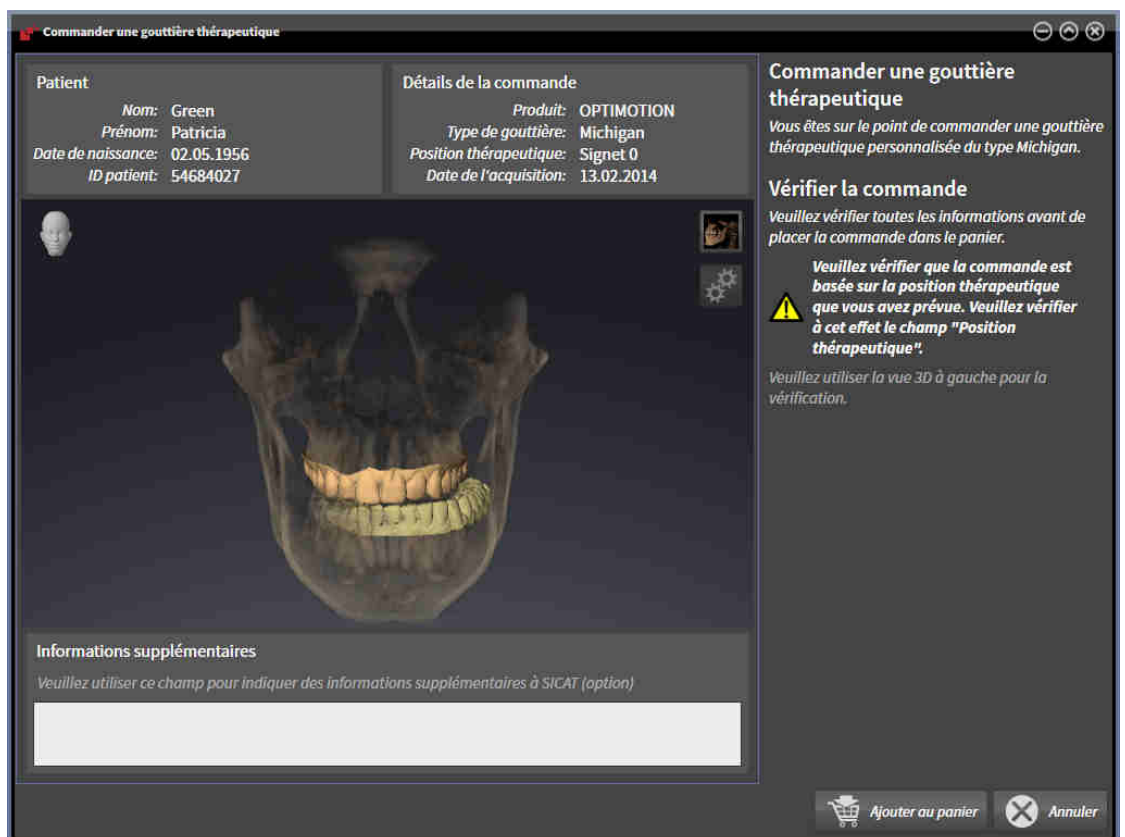

1. Vérifiez dans la zone **Patient** et dans la zone **Détails de la commande** que les informations relatives au patient et à la radiographie sont correctes.
2. Vérifiez dans la vue **3D** que la position thérapeutique est correcte.
3. Si vous le souhaitez, entrez des informations supplémentaires à destination de SICAT dans le champ **Informations supplémentaires**.



4. Cliquez sur le bouton **Dans le panier**.
 - ▶ SICAT Function insère les données de planification de gouttières thérapeutiques souhaitées dans le panier de SICAT Suite.
 - ▶ La fenêtre **Commander une gouttière thérapeutique** se ferme.
 - ▶ SICAT Function ouvre le panier de SICAT Suite.



Tant qu'une commande se trouve dans le panier, vous ne pouvez plus écraser les empreintes optiques, les données de mouvement de la mâchoire et la position thérapeutique d'une planification. Cela ne redeviendra possible qu'après terminaison ou suppression de la commande. Si vous écrasez ou supprimez les empreintes optiques, les données de mouvement de la mâchoire ou la position thérapeutique d'une planification, vous ne pourrez plus commander encore une fois la même gouttière thérapeutique.



Vous pouvez annuler la commande en cliquant sur **Annuler**.

poursuivez avec *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 208 - Standalone].

35.3 OUVRIR LE PANIER



L'icône **Panier d'achat** affiche le nombre d'éléments dans le panier.

Le panier contient au moins un produit.



- Si le panier n'est pas encore ouvert, cliquez dans la **Barre de navigation** sur le bouton **Panier d'achat**.

▶ La fenêtre **Panier d'achat** s'ouvre.

Poursuivez avec l'action suivante :

- *Contrôler le panier et terminer la commande* [▶ Page 208 - Standalone]

35.4 CONTRÔLER LE PANIER ET TERMINER LA COMMANDE

- ☑ La fenêtre **Panier d'achat** est déjà ouverte. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir le panier* [► Page 207 - Standalone].



1 Liste **ARTICLE À COMMANDER**

2 Bouton **Terminer la commande**

1. Contrôlez dans la fenêtre **Panier d'achat** si tous les produits souhaités sont contenus.
2. Cliquez sur le bouton **Terminer la commande**.
 - SICAT Suite met le statut des commandes sur **En préparation** et établit une connexion au serveur SICAT via le SICAT WebConnector.
 - Avec une connexion Internet active, il n'est plus possible de modifier la commande que dans SICAT Portal.

Poursuivez avec une des actions suivantes :

- *Terminer une commande via une connexion Internet active* [► Page 209 - Standalone]
- *Terminer une commande sans connexion Internet active* [► Page 213 - Standalone]

35.5 TERMINER UNE COMMANDE VIA UNE CONNEXION INTERNET ACTIVE



Sous certaines versions de Windows, il vous faut régler un navigateur standard afin que le processus de commande fonctionne.

- L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute est équipé d'une connexion Internet active.
 - SICAT Portal a été ouvert automatiquement dans votre navigateur.
1. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
 - ▶ La vue d'ensemble de votre commande s'ouvre et affiche les produits contenus, groupés par patient, ainsi que les prix.
 2. Suivez les instructions dans *Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal* [▶ Page 210 - Standalone].
 - ▶ SICAT Suite prépare les données de commande pour le téléchargement.
 - ▶ Au terme des préparatifs, SICAT WebConnector transfère les données de commande sur le serveur SICAT via une connexion cryptée.
 - ▶ Le statut de la commande dans le panier passe à **En chargement**.



SICAT Suite visualise les commandes tant que le chargement n'est pas terminé. Ceci s'applique également aux commandes qui sont chargées sur un autre ordinateur, lorsque plusieurs ordinateurs utilisent le dépôt de dossiers patient actif. Dans le panier, vous pouvez mettre en pause, poursuivre ou annuler le chargement de commandes démarrées sur l'ordinateur actuel



Si vous vous déconnectez de Windows pendant le chargement, SICAT WebConnector met la procédure en pause. Le logiciel poursuit automatiquement le chargement après la nouvelle connexion.

35.6 EXÉCUTER LES ÉTAPES DE COMMANDE DANS SICAT PORTAL

Une fois que vous avez effectué les étapes de commande dans SICAT Suite, SICAT Portal s'ouvre dans votre navigateur Web standard. Dans SICAT Portal, vous avez la possibilité de modifier vos commandes, de sélectionner des fournisseurs qualifiés pour la fabrication et de consulter les prix des produits.

Procédez de la manière suivante pour exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal :

1. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
2. Contrôlez si les produits souhaités sont contenus.
3. Si nécessaire, supprimez des patients et, par la même occasion, les produits associés, de la vue d'ensemble de la commande. Lors de la finalisation de la commande, SICAT Suite reprend les modifications que vous avez effectuées dans SICAT Portal.
4. Vérifiez si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont correctes. Modifiez-les, si nécessaire.
5. Choisissez la méthode d'expédition souhaitée.
6. Acceptez les conditions générales de vente et envoyez la commande.



Vous pouvez supprimer des patients et toutes les gouttières associées de SICAT Portal en sélectionnant un patient et en cliquant sur le bouton de suppression de patients. Dans le panier, vous avez à nouveau pleinement accès à l'ensemble des produits.

35.7 SICAT WEBCONNECTOR



Le SICAT WebConnector nécessite des ports déterminés pour la communication avec le serveur SICAT. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Configuration système requise* [► Page 8 - Standalone].



Sous certaines versions de Windows, il vous faut régler un navigateur standard afin que le processus de commande fonctionne.


Si l'ordinateur sur lequel s'exécute SICAT Suite dispose d'une connexion Internet active, SICAT Suite transmet vos commandes sous forme cryptée, en tâche de fond, via le SICAT WebConnector. SICAT Function affiche le statut des transferts directement dans le panier et peut mettre le SICAT WebConnector en pause. SICAT WebConnector poursuit le transfert même lorsque vous avez fermé SICAT Suite. S'il n'est pas possible d'effectuer le chargement comme souhaité, vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur du SICAT WebConnector.

OUVRIR LA FENÊTRE "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- Cliquez dans la zone de notification de la barre des tâches sur l'icône **SICAT Suite WebConnector**.

► La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** s'ouvre :

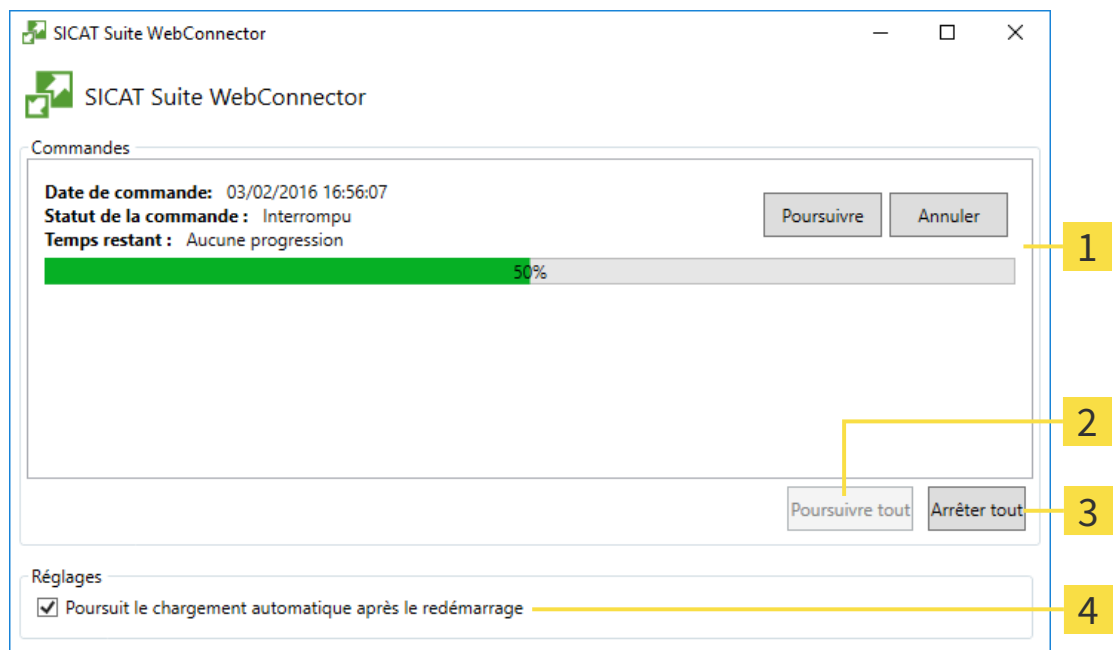

1 Liste **Commandes**

3 Bouton **Interrompre tous**

2 Bouton **Poursuivre tous**

4 Case à cocher **Poursuite automatique du chargement après le redémarrage**

La liste **Commandes** affiche la file d'attente de la commande.

INTERROMPRE ET POURSUIVRE LE CHARGEMENT

Vous pouvez interrompre la procédure de chargement. Ceci peut s'avérer utile lorsque votre liaison Internet est surchargée. Les réglages ne s'appliquent qu'aux procédures de chargement dans SICAT WebConnector. Les procédures de chargement via le navigateur Web ne sont pas concernées.

- ☑ La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** est déjà ouverte.
- 1. Cliquez sur le bouton **Interrompre tous**.
 - ▶ SICAT WebConnector interrompt le chargement de toutes les commandes.
- 2. Cliquez sur le bouton **Poursuivre tous**.
 - ▶ SICAT WebConnector poursuit le chargement de toutes les commandes.

DÉSACTIVER LA POURSUITE AUTOMATIQUE APRÈS UN REDÉMARRAGE

Vous pouvez éviter que SICAT WebConnector ne poursuive automatiquement le chargement après un redémarrage de Windows.

- ☑ La fenêtre **SICAT Suite WebConnector** est déjà ouverte.
 - Désactivez la case à cocher **Poursuite automatique du chargement après le redémarrage**.
- ▶ Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, SICAT WebConnector ne poursuit pas automatiquement le chargement de vos commandes.

35.8 TERMINER UNE COMMANDE SANS CONNEXION INTERNET ACTIVE

SICAT Suite ouvre la fenêtre **Erreur lors de la connexion au serveur SICAT** quand l'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute ne peut pas établir une connexion avec le serveur SICAT. La fenêtre vous indique une des causes suivantes du problème :

- **Aucune connexion Internet n'est disponible SICAT WebConnector n'a pas pu établir la connexion au serveur SICAT**
- **Le portail SICAT n'est pas accessible**
- **Le service « SICATWebConnector » n'est pas installé**
- **Le service « SICATWebConnector » n'est pas démarré**
- **Une erreur inconnue s'est produite. SICAT WebConnector n'a pas pu établir la connexion au serveur SICAT**

Ce chapitre montre uniquement les captures d'écran pour le cas où il n'y a aucune connexion Internet disponible.

Le paragraphe Causes indique des étapes possibles pour éliminer le problème.

Sinon, vous pouvez télécharger une commande sur un autre ordinateur avec une connexion Internet active par un navigateur Web à des fins de dépannage. En cas de commande par navigateur Web, SICAT Suite exporte tous les produits du panier à la fois, et crée un sous-dossier par patient. Chaque sous-dossier comprend un fichier XML avec les informations concernant la commande et une archive Zip avec les données dont SICAT a besoin pour la production. Vous pouvez ensuite télécharger consécutivement le fichier XML et l'archive Zip dans SICAT Portal. Le transfert est crypté.

Procédez de la manière suivante pour terminer la commande sans connexion Internet active :


- L'ordinateur sur lequel SICAT Suite s'exécute n'est pas équipé d'une connexion Internet active.
- Une fenêtre affiche le message suivant : **Erreur lors de la connexion au serveur SICAT**



1 Bouton **Charger depuis un autre ordinateur**

1. Cliquez sur le bouton **Charger depuis un autre ordinateur**.

► La fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur** s'ouvre :

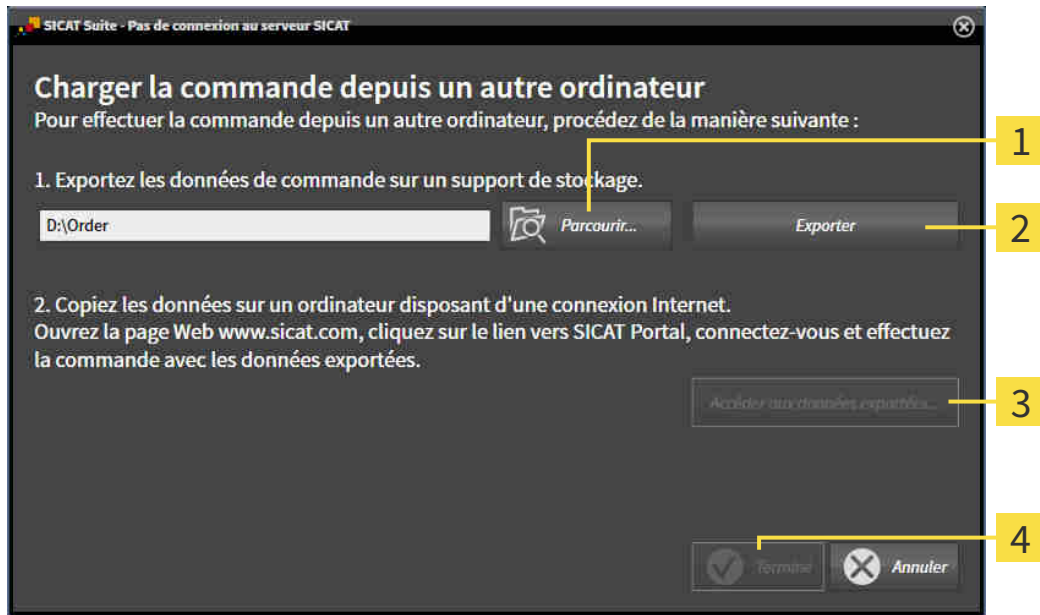

1 Bouton **Parcourir**

3 Bouton **Accéder aux données exportées**

2 Bouton **Exporter**

4 Bouton **Terminé**

2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.

► Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre.


3. Sélectionnez un répertoire existant ou créez un nouveau répertoire puis cliquez sur **OK**. Veuillez noter que le chemin du répertoire ne doit pas dépasser 160 caractères.

4. Cliquez sur le bouton **Exporter**.

► SICAT Suite exporte vers le dossier sélectionné tous les fichiers qui sont nécessaires pour la commande du contenu du panier. Ce faisant, SICAT Suite crée un sous-dossier pour chaque patient.

5. Cliquez sur le bouton **Accéder aux données exportées**.

- ▶ Une fenêtre de l'explorateur de fichiers de Windows s'ouvre, qui affiche le répertoire avec les données exportées :

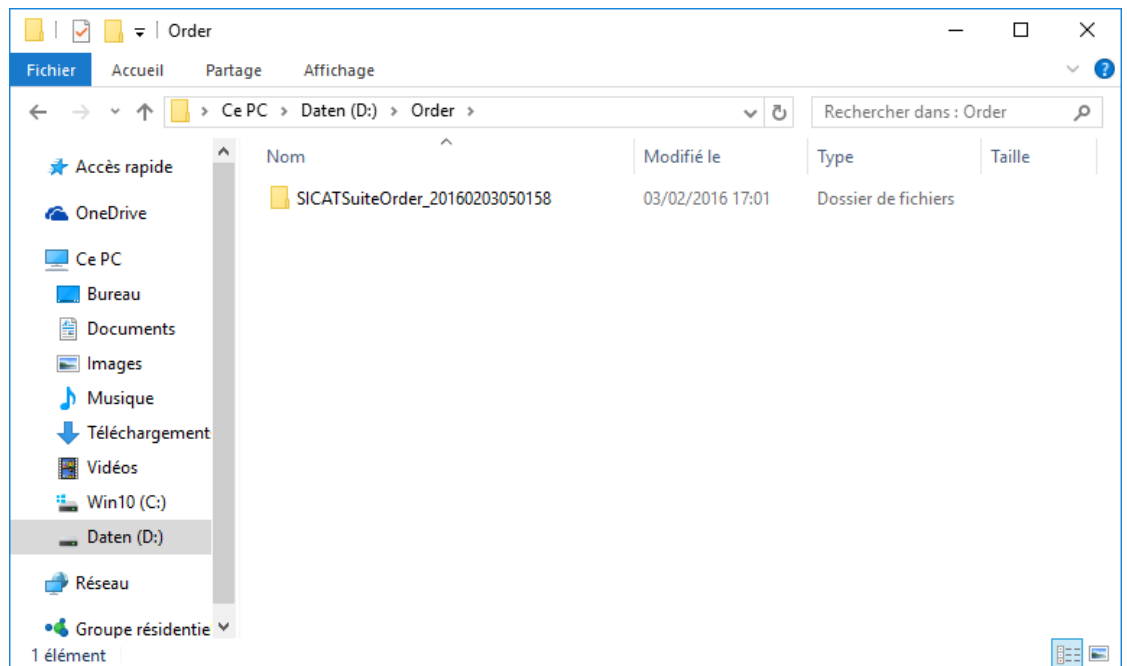

6. Copiez le dossier contenant les données de la gouttière souhaitée sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active, par exemple par l'intermédiaire d'une clé USB.
7. Dans la fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur**, cliquez sur **Terminé**.
 - ▶ SICAT Suite ferme la fenêtre **Charger la commande depuis un autre ordinateur**.
 - ▶ SICAT Suite supprime du panier tous les produits contenus dans la commande.
8. Sur l'ordinateur doté d'une connexion Internet active, ouvrez un navigateur Web et ouvrez la page Internet <http://www.sicat.de>.
9. Cliquez sur le lien vers SICAT Portal.
 - ▶ SICAT Portal s'ouvre.
10. Si cela n'est pas déjà fait, connectez-vous à SICAT Portal avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
11. Cliquez sur le lien pour télécharger la commande.
12. Sélectionnez la commande voulue sur l'ordinateur équipé de la connexion Internet active. Il s'agit d'un fichier XML dont le nom commence par **SICATSuiteOrder**.
 - ▶ La vue d'ensemble de votre commande s'ouvre et affiche le patient contenu, les produits correspondants ainsi que le prix.
13. Suivez les instructions dans *Exécuter les étapes de commande dans SICAT Portal* [▶ Page 210 - Standalone].
14. Cliquez sur le lien pour télécharger les données de planification du produit.

15. Sélectionnez les données de produits sur l'ordinateur équipé de la connexion Internet active. Il s'agit d'une archive ZIP qui se trouve dans le même dossier que le fichier XML précédemment chargé et dont le nom commence par **SICATSuiteExport**.
- Si vous avez exécuté la commande, votre navigateur transfère l'archive contenant les données de produits sur le serveur SICAT via une liaison cryptée.



SICAT Suite ne supprime pas automatiquement les données exportées. Une fois un processus de commande terminé, il est recommandé de supprimer manuellement les données exportées, dans un souci de sécurité.

36 RÉGLAGES

Vous pouvez modifier ou visualiser les réglages généraux dans la fenêtre **Réglages**. Après que vous avez cliqué sur l'icône **Réglages**, la barre d'options sur le côté gauche de la fenêtre **Réglages** affiche les onglets suivants :

- **Généralités** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utiliser les réglages généraux* [► Page 218 - Standalone].
- **Vos dépôts de dossiers patient** - Uniquement disponible dans la version standalone de SICAT Suite. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Dépôts de dossiers patient* [► Page 53 - Standalone].
- **Licences** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [► Page 44 - Standalone].
- **Cabinet** - Visionner ou modifier le logo et le texte d'information de votre cabinet, par ex. pour leur utilisation sur les imprimés. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Utiliser les informations sur le cabinet* [► Page 222 - Standalone].
- **Visualisation** - Modifier les réglages de visualisation généraux. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier les réglages de visualisation* [► Page 223 - Standalone].
- **SICAT Function** - Modifier les réglages spécifiques à une application de SICAT Function. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Modifier les réglages de SICAT Function* [► Page 225 - Standalone].

Si vous modifiez les réglages, SICAT Function prend en charge immédiatement les modifications et enregistre les réglages dans votre profil d'utilisateur.

36.1 UTILISER LES RÉGLAGES GÉNÉRAUX


Procédez de la manière suivante pour ouvrir les réglages généraux :



1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Généralités**.
▶ La fenêtre **Généralités** s'ouvre :

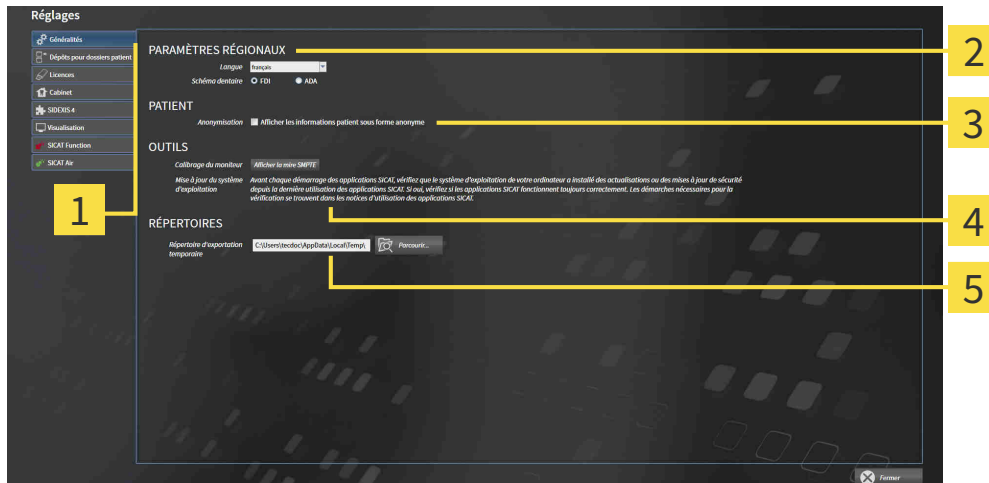

1 Onglet **Généralités**

4 Zone **OUTILS**

2 Zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**

5 Zone **RÉPERTOIRES**

3 Zone **PATIENT**

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- Dans la zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**, vous pouvez modifier la langue de l'interface utilisateur dans la liste **Langue**.
- Dans la zone **PARAMÈTRES RÉGIONAUX**, vous pouvez modifier le schéma dentaire actuel sous **Schéma dentaire**.
- Dans la zone **PATIENT**, vous pouvez modifier l'état de la case à cocher **Afficher les informations patient sous forme anonyme**. Si la case est cochée, SICAT Suite affiche les attributs du dossier patient dans la **Barre de navigation** sous la forme **Patient** pour le **NomAnonyme** pour le **Prénom** et **01.01.** suivi de l'année de naissance pour la **Date de naissance**. Dans la fenêtre **SICAT Suite Home**, SICAT Suite masque la liste **Derniers dossiers patient**.
- Dans la zone **RÉPERTOIRES**, vous pouvez indiquer dans le champ **Répertoire d'exportation temporaire** un dossier dans lequel SICAT Suite enregistre les données de commande. Vous devez disposer d'un accès sans restriction à ce dossier.


En plus de visionner ou de modifier les réglages généraux, il vous est également possible d'ouvrir la mire SMPTE pour calibrer votre moniteur :

- Cliquez sous **OUTILS** **Calibrage du moniteur**, sur le bouton **Afficher la mire SMPTE**, afin de calibrer votre moniteur. Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Calibrage du moniteur avec la mire SMPTE* [▶ Page 220 - Standalone].



Les schémas dentaires pris en charge sont FDI et ADA.

36.2 CALIBRAGE DU MONITEUR AVEC LA MIRE SMPTE



ATTENTION


Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

Quatre propriétés principales déterminent si votre moniteur est apte à visualiser les données dans les applications SICAT :

- Luminosité
- Contraste
- Résolution spatiale (linéarité)
- Distorsion (aliasing)

La mire SMPTE est une image de référence qui vous permet de contrôler les propriétés de votre moniteur :

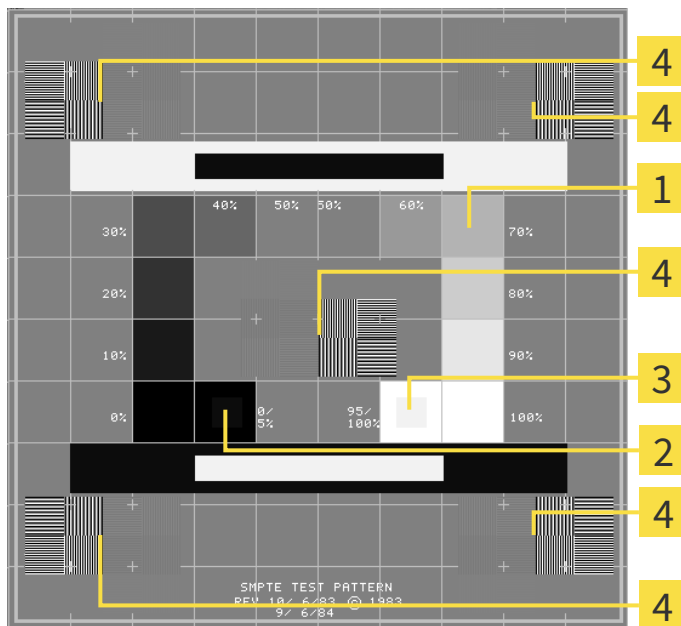

- | | |
|--|--|
| <p>1 Carrés de niveaux de gris</p> <p>2 Carré 0%</p> | <p>3 Carré 100%</p> <p>4 Carrés contenant un motif de traits à contraste élevé</p> |
|--|--|

CONTRÔLER LA LUMINOSITÉ ET LE CONTRASTE

Au centre de la mire SMPTE, une rangée de carrés indique les niveaux de gris de noir (luminosité 0 %) à blanc (luminosité 100 %) :

- Le carré 0% contient un plus petit carré servant à indiquer la différence de luminosité entre 0 % et 5 %.
- Le carré 100 % contient un plus petit carré servant à indiquer la différence de luminosité entre 95 % et 100 %.

Procédez de la manière suivante pour contrôler ou régler votre moniteur :

- La mire SMPTE est déjà ouverte.
- Contrôlez si vous pouvez observer la différence visuelle entre le carré intérieur et le carré extérieur dans les carrés 0 % et 100 %. Si nécessaire, modifiez les réglages de votre moniteur.



De nombreux moniteurs peuvent uniquement visualiser la différence de luminosité dans le carré 100 % et pas dans le carré 0 %. Vous pouvez réduire la lumière ambiante afin d'améliorer le pouvoir de distinction des différents niveaux de luminosité dans le carré 0 %.

CONTRÔLER LA RÉOLUTION SPATIALE ET LA DISTORSION

Dans les coins et au centres de la mire SMPTE, 6 carrés affichent un motif de traits à contraste élevé. En ce qui concerne la résolution spatiale et la distorsion, vous devez être en mesure de distinguer entre des lignes horizontales et verticales, de différentes largeurs, alternant le noir et le blanc :

- du plus large au plus étroit (6 pixels, 4 pixels, 2 pixels)
- horizontal et vertical

Procédez de la manière suivante pour contrôler ou régler votre moniteur :

- Contrôlez si vous distinguez toutes les lignes dans les 6 carrés affichant le motif de traits de contraste élevé. Si nécessaire, modifiez les réglages de votre moniteur.

FERMER LA MIRE SMPTE

Procédez de la manière suivante pour fermer la mire SMPTE :

- Appuyez sur la touche **Échap**.
- ▶ La mire SMPTE se ferme.

36.3 UTILISER LES INFORMATIONS SUR LE CABINET

Les applications de SICAT Suite utilisent le logo ainsi que les informations affichées ici pour individualiser les imprimés ou les fichiers PDF.

Procédez de la manière suivante pour ouvrir les informations sur le cabinet :



1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Réglages**.

► La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Cabinet**.

► La fenêtre **CABINET** s'ouvre :



1 Onglet **Cabinet**

2 Zone **Logo**

3 Zone **Information**

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- Dans la zone **Logo**, vous pouvez définir le logo de votre cabinet. Le bouton **Modifier** vous permet de sélectionner le logo de votre cabinet. SICAT Suite copie le fichier indiqué dans votre répertoire utilisateur SICAT Suite.
- Dans la zone **Information**, vous pouvez saisir un texte identifiant votre cabinet, p. ex. le nom et l'adresse. Vous pouvez augmenter le nombre de lignes (maximum 5) en appuyant sur la touche **Entrée**. Vous pouvez annuler les modifications du texte d'information en cliquant sur le bouton **Rejeter les modifications**.

36.4 MODIFIER LES RÉGLAGES DE VISUALISATION


ATTENTION

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.


ATTENTION

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

Les réglages de visualisation définissent la visualisation du volume, des objets de diagnostic et des objets de planification dans toutes les applications SICAT.


Procédez de la manière suivante pour ouvrir la fenêtre **Visualisation** :



1. Cliquez sur l'icône **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **Visualisation**.
▶ La fenêtre **Visualisation** s'ouvre :

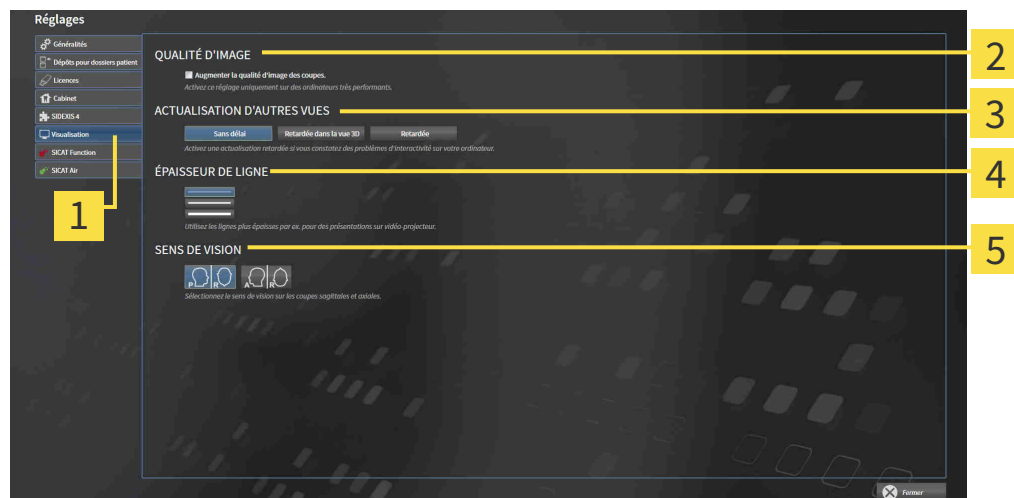

1 Onglet **Visualisation**

2 Zone **QUALITÉ D'IMAGE**

3 Zone **ACTUALISATION D'AUTRES VUES**

4 Zone **ÉPAISSEUR DE LIGNE**

5 Zone **SENS DE VISION**

Les réglages suivants sont disponibles :

- **Augmenter la qualité d'image des coupes** - Améliore la qualité de représentation des coupes, par moyennage des coupes voisines, par le logiciel. Activez ce réglage uniquement sur des ordinateurs très performants.
- **ACTUALISATION D'AUTRES VUES** - L'actualisation retardée améliore l'interactivité de la vue active, au prix d'une actualisation retardée des autres vues. N'activez l'actualisation retardée que si vous constatez des problèmes d'interactivité sur votre ordinateur.
- **ÉPAISSEUR DE LIGNE** - Modifie l'épaisseur des lignes. Des lignes plus épaisses sont utiles pour des présentations sur vidéo-projecteur.
- **SENS DE VISION** - Commute le sens de vision de la vue de coupe **Axial** et de la vue de coupe **Sagittal**.

36.5 MODIFIER LES RÉGLAGES DE SICAT FUNCTION

SICAT Function Les réglages définissent la synchronisation Panoramique et la synchronisation Zoom dans l'espace de travail **TMJ** de SICAT Function.


Procédez de la manière suivante pour modifier les réglages de SICAT Function :



1. Cliquez sur l'icône **Réglages**.
▶ La fenêtre **Réglages** s'ouvre.



2. Cliquez sur l'onglet **SICAT Function**.
▶ La fenêtre **SICAT Function** s'ouvre :

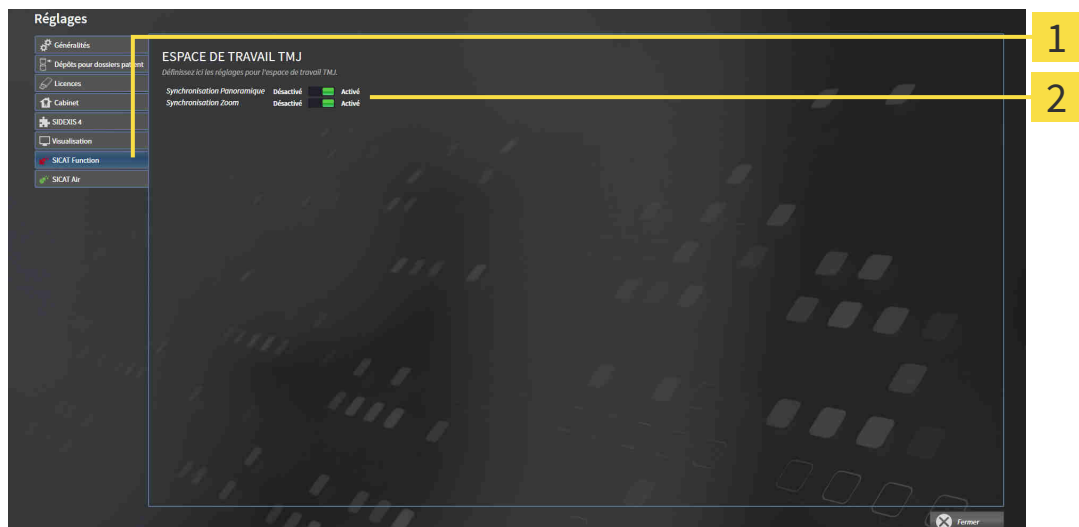

1 Onglet **SICAT Function**

2 Zone **Définissez ici les réglages pour l'espace de travail TMJ**

Les réglages suivants sont disponibles :

- **Synchronisation Panning**
- **Synchronisation Zoom**

Les réglages vous permettent d'activer ou de désactiver le fait que SICAT Function synchronise la panoramisation ou le zoom des vues dans l'espace de travail **TMJ** entre le condyle gauche et le condyle droit.


37 ASSISTANCE

SICAT offre les possibilités d'assistance suivantes :

- Documents PDF
- Informations de contact
- Informations sur le logiciel SICAT Suite installé et les applications SICAT installées

Poursuivez avec l'action suivante :

- *Ouvrir les possibilités d'assistance* [▶ *Page 227 - Standalone*]

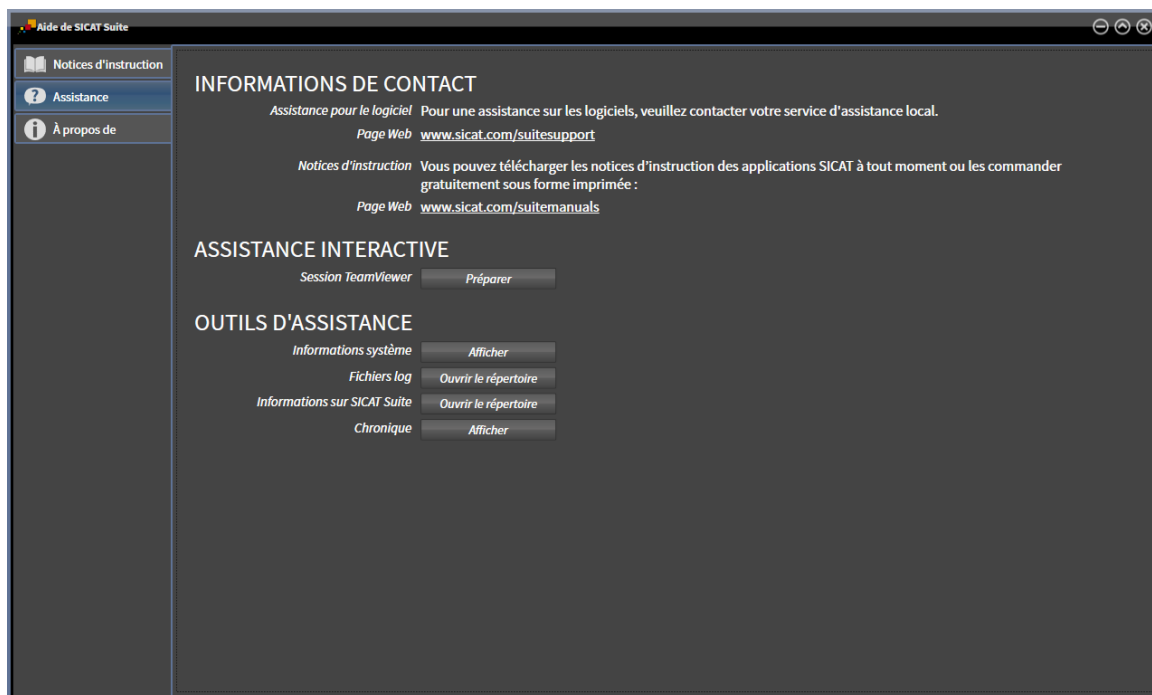

37.1 OUVRIR LES POSSIBILITÉS D'ASSISTANCE



Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Assistance** en cliquant sur l'icône **Assistance** dans la **Barre de navigation** ou en appuyant sur la touche F1.

La fenêtre **Assistance** de SICAT Suite se compose des onglets suivants :



- **Notice d'instruction** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Ouvrir les instructions de service* [▶ Page 43 - Standalone].



- **Assistance** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Informations de contact et outils d'assistance* [▶ Page 228 - Standalone].



- **Info** - Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Info* [▶ Page 229 - Standalone].

37.2 INFORMATIONS DE CONTACT ET OUTILS D'ASSISTANCE

La fenêtre **Assistance** contient l'ensemble des informations et des outils utiles à l'assistance SICAT :



1 Onglet **Assistance**

3 Zone **ASSISTANCE INTERACTIVE**

2 Zone **INFORMATIONS DE CONTACT**

4 Zone **OUTILS D'ASSISTANCE**

La zone **INFORMATIONS DE CONTACT** vous indique comment vous procurer des notices d'instruction.

Les outils suivants sont disponibles dans la zone **ASSISTANCE INTERACTIVE** :

- Lorsque vous cliquez dans la zone **Session TeamViewer** sur le bouton **Préparer**, SICAT Function, ouvre une session TeamViewer.


TeamViewer est un logiciel permettant de télécommander les commandes de la souris et du clavier et de transférer le contenu de l'écran d'un ordinateur via une connexion Internet active. TeamViewer n'établit la connexion qu'avec votre accord explicite. À cet effet, vous communiquez à l'assistance SICAT un ID TeamViewer et un mot de passe. L'assistance SICAT est ainsi en mesure de vous aider directement sur site.

Les outils suivants sont disponibles dans la zone **OUTILS D'ASSISTANCE** :

- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations système** sur le bouton **Afficher**, SICAT Function, ouvre les informations du système d'exploitation.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Fichiers log** sur le bouton **Ouvrir le répertoire**, SICAT Function ouvre le répertoire log de SICAT Suite dans une fenêtre de l'explorateur de fichiers Windows.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations sur SICAT Suite** sur le bouton **Ouvrir le répertoire**, SICAT Function exporte des informations sur l'installation actuelle dans un fichier de texte.
- Lorsque vous cliquez dans la zone **Informations sur SICAT Suite** sur le bouton **Afficher les notifications** SICAT Function affiche la fenêtre des notifications.

37.3 INFO

La fenêtre **Info** affiche dans plusieurs onglets des informations sur SICAT Suite et sur toutes les applications SICAT installées :

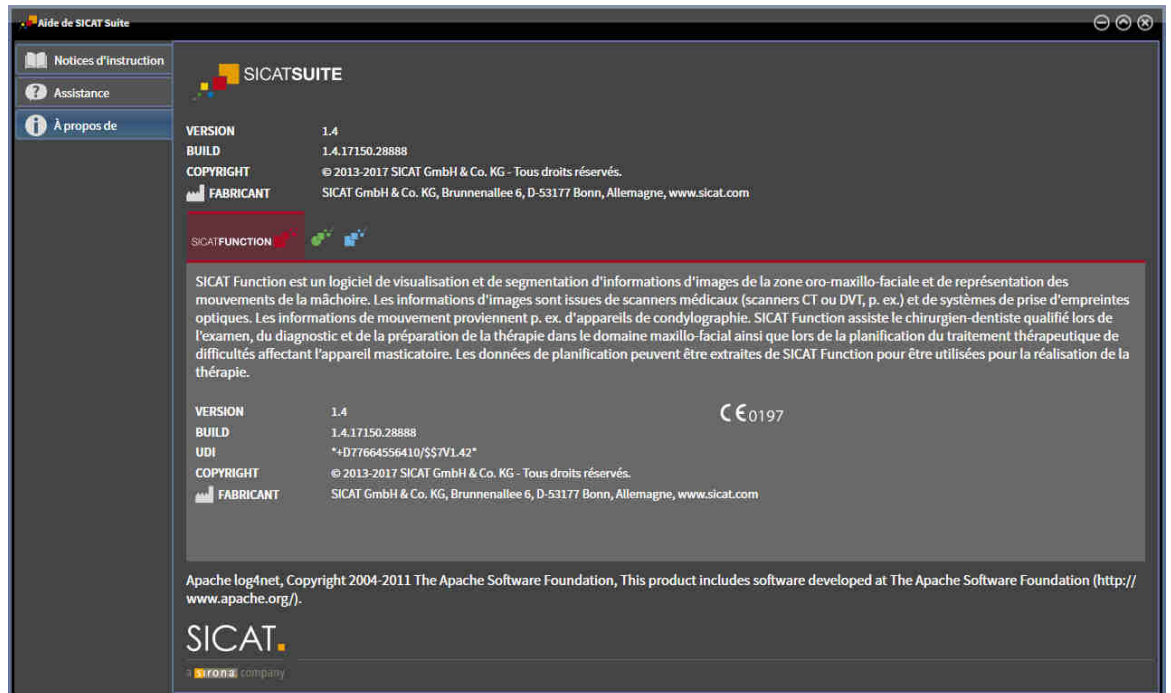

38 OUVRIR LES DONNÉES EN MODE DE LECTURE SEULE

Vous pouvez ouvrir les données en mode de lecture seule

Les types des données que vous pouvez visualiser dans la version standalone, sans possibilité de les modifier et de les enregistrer, dépendent du statut de la licence et de la disponibilité d'un dépôt de dossiers patient :

TYPE DE LA LICENCE SICAT FUNCTION	DÉPÔT DE DOSSIERS PATIENT ACTIF ?	POSSIBILITÉ DE VISIONNER SANS MODIFIER ?
Aucune	Non pertinent	Non
Viewer	Non pertinent	Pour données SICAT
Version complète	Non	Oui
Version complète	Oui	Non


Vous ne pouvez que visionner les données DICOM si vous avez activé une licence en version complète de SICAT Function et si aucun dépôt de dossiers patient n'est activé.

Procédez de la manière suivante pour visualiser des données sans possibilité de les modifier et de les enregistrer :



1. Cliquez dans la **Barre de navigation** sur l'icône **Visualiser les données**.

► La fenêtre **Visualiser les données** s'ouvre :

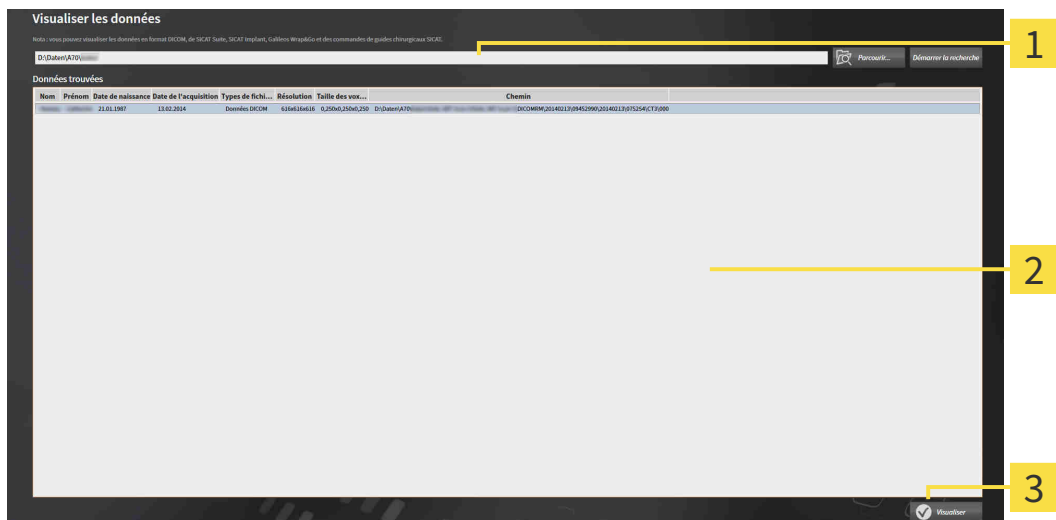

1 Champ **Où se trouvent les données**

2 Liste **Données trouvées**

3 Bouton **Visualiser**



2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**.

► La fenêtre **Sélectionner le fichier ou le répertoire** s'ouvre.

3. Sélectionnez dans la fenêtre **Sélectionner le fichier ou le répertoire** le fichier ou le dossier contenant les données à visualiser puis cliquez sur **OK**.
 - ▶ SICAT Suite ferme la fenêtre **Sélectionner le fichier ou le répertoire** et reporte le chemin du fichier ou du dossier sélectionné dans le champ **Où se trouvent les données**.
 - ▶ Si vous avez sélectionné un fichier compatible, SICAT Suite affiche le contenu du fichier dans la liste **Données trouvées**.
 - ▶ Si vous avez sélectionné un dossier, SICAT Suite parcourt le dossier et tous les sous-dossiers. SICAT Suite affiche dans la liste **Données trouvées** les fichiers compatibles qui sont contenus dans un des dossiers parcourus.
4. Sélectionnez la radiographie 3D ou le projet de planification souhaité(e) dans la liste **Données trouvées** et cliquez sur le bouton **Visualiser les données**.
 - ▶ SICAT Suite crée un dossier patient temporaire contenant les radiographies 3D et les projets de planification, et l'active.
5. poursuivez avec *Travailler avec des dossiers patient actifs* [▶ Page 76 - Standalone].

Vous pouvez aussi tirer un fichier compatible ou un dossier dans le champ **Où se trouvent les données** par glisser-déposer afin de sélectionner des données.



Si vous utilisez la procédure décrite, la recherche démarre automatiquement. Vous pouvez annuler la recherche en cliquant sur le bouton **Arrêter la recherche**. Si vous entrez manuellement un chemin de fichier ou de dossier dans le champ **Où se trouvent les données**, vous devez cliquer sur le bouton **Démarrer la recherche**. Celui-ci est également utile pour redémarrer une recherche dans le cas où le contenu du dossier a changé ou si vous avez terminé la recherche par inadvertance.



Les conditions suivantes doivent être remplies afin que vous puissiez adapter l'orientation du volume et la courbe panoramique:

- Vous avez activé une licence avec laquelle vous pouvez ouvrir des radiographies 3D ou des études SICAT Function Vous trouverez des informations à ce sujet sous *Licences* [▶ Page 44 - Standalone].
- Il existe des objets dans aucune étude afférente SICAT Function en mode de lecture seule pour la radiographie 3D ou d'une autre application SICAT qui seraient concernés par une modification de l'orientation du volume ou de la courbe panoramique.

Si les conditions ne sont pas remplies, SICAT Function désactive dans la fenêtre **Adapter l'orientation du volume et la zone panoramique** les boutons et éléments de contrôle que vous pourriez utiliser à des fins de modification de l'orientation du volume ou de la courbe panoramique.

39 *FERMER SICAT FUNCTION*

Procédez de la manière suivante pour fermer SICAT Function :



- X ■ Dans la zone du dossier patient actif, cliquez sur le bouton **Fermer**.
 - ▶ SICAT Suite enregistre le dossier patient actif.
 - ▶ SICAT Suite ferme toutes les applications SICAT.
 - ▶ SICAT Suite ferme le dossier patient actif.

40 *FERMER SICAT SUITE*



- Dans le coin supérieur droit de SICAT Suite, cliquez sur le bouton **Fermer**.
- ▶ Si SICAT Suite s'exécute en version complète, dispose des droits d'accès en écriture et qu'une étude est ouverte, il enregistre tous les projets de planification.
- ▶ SICAT Suite se ferme.

41 RACCOURCIS CLAVIER



Lorsque vous amenez le pointeur de la souris sur certaines fonctions, SICAT Function affiche le raccourci clavier entre parenthèses à côté de la désignation de la fonction.

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans toutes les applications SICAT :

RACCOURCIS CLAVIER	DESCRIPTION
A	Ajouter une mesure d'angle
D	Ajouter une mesure de distance
F	Focaliser l'objet actif
Ctrl + C	Copier le contenu de la vue active dans le presse-papiers
Ctrl + Z	Annuler la dernière dernière manipulation d'un objet
Ctrl + Y	Répéter la dernière manipulation annulée d'un objet
Suppr	Supprimer l'objet actif ou le groupe actif
Échap	Annuler l'action actuelle (par ex. l'ajout d'une mesure)
F1	Ouvrir la fenêtre Assistance , ouvrir les instructions de service lorsque l'application SICAT est activée

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles dans la fenêtre **Segmentation de la mandibule** de SICAT Function :

RACCOURCIS CLAVIER	DESCRIPTION
N	Navigation
M	Segmenter la mandibule
F	Segmenter les fosses
B	Segmenter l'arrière-plan

42 DÉSINSTALLER SICAT SUITE



Le programme de désinstallation de SICAT Suite conserve toutes les licences actives sur votre ordinateur. C'est pourquoi le programme d'installation de SICAT Suite vous avertit avant la désinstallation qu'il ne supprime pas automatiquement les licences. Si vous ne souhaitez plus utiliser SICAT Suite sur cet ordinateur, désactivez les licences avant la désinstallation. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *Restituer des licences au pool de licences* [► Page 51 - Standalone].



Avant de désinstaller SICAT Suite, assurez-vous que SICAT WebConnector a bien téléchargé toutes les commandes, car le programme de désinstallation ferme automatiquement SICAT WebConnector. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le paragraphe *SICAT WebConnector* [► Page 211 - Standalone].

Procédez de la manière suivante pour désinstaller SICAT Suite :

SICAT WebConnector a téléchargé toutes les commandes avec succès

1. Dans le **Panneau de configuration** de Windows, cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.

► La fenêtre **Programmes et fonctionnalités** s'ouvre.

2. Sélectionnez dans la liste l'entrée **SICAT Suite**, celle-ci contenant en outre la version de SICAT Suite.

3. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.

► Le programme de désinstallation démarre et la fenêtre **PROGRESSION** s'ouvre :



- Une fois la désinstallation terminée, la fenêtre **CONFIRMATION** s'ouvre :



4. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

- Le programme de désinstallation de SICAT Suite se ferme.



Pour ouvrir le programme de désinstallation de SICAT Suite, vous pouvez également lancer le programme d'installation sur un ordinateur sur lequel SICAT Suite est déjà installé.



Le programme de désinstallation de SICAT Suite appelle le programme de désinstallation de certains logiciels requis qui ont été installés avec SICAT Suite. Si d'autres applications installées ont besoin de ces logiciels, ils ne sont pas supprimés.

43 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RADIOGRAPHIES 3D



ATTENTION

Des appareils de radiographie inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les radiographies 3D d'appareils de radiographie qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



ATTENTION

Des appareils de radiographie 3D inadaptés peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez systématiquement la qualité, l'intégrité et l'orientation correcte des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Des appareils de radiographie non conformes à DICOM peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que des radiographies 3D d'appareils de radiographie munis d'une déclaration de conformité DICOM.

CONDITIONS DE VISUALISATION



ATTENTION

Une qualité de visualisation insuffisante peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez avant d'utiliser une application SICAT si la qualité de visualisation est suffisante, par ex. à l'aide de la mire SMPTE.



ATTENTION

Des conditions ambiantes de visualisation insuffisantes peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

1. N'effectuez une planification que si les conditions ambiantes permettent une qualité de visualisation suffisante. Contrôlez par exemple si l'éclairage est suffisant.
2. Contrôlez la qualité de la visualisation au moyen de la mire SMPTE.

GESTION DES DONNÉES



ATTENTION

Une affectation incorrecte des noms de patient ou des radiographies 3D peut entraîner une confusion entre les radiographies de patients.

Vérifiez que la radiographie 3D que vous voulez importer ou qui est déjà chargée dans une application SICAT est affectée au nom correct du patient et aux informations correctes de radiographie.



ATTENTION

La suppression des données originales peut entraîner une perte de données.

Ne supprimez pas les données originales après l'importation.



L'absence d'un procédé de sauvegarde des données des dépôts de dossiers patient peut entraîner la perte irrémédiable de données patient.

Assurez-vous qu'une sauvegarde périodique des données de tous les dépôts de dossiers patient est réalisée.



Lorsque vous supprimez des dossiers patient, toutes les radiographies 3D et tous les projets de planification qui y sont contenus sont également supprimés.

Ne supprimez des dossiers patient que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des radiographies 3D, des projets de planification et des fichiers PDF qu'ils contiennent.



Les dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Ne supprimez des dossiers patient, études, radiographies 3D et projets de planification que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin de ces données.



Lorsque vous supprimez des radiographies 3D, tous les projets de planification qui en dépendent sont également supprimés.

Ne supprimez des radiographies 3D que si vous êtes sûr(e) de ne plus jamais avoir besoin des projets de planification qui en dépendent.

RÉSEAU



L'enregistrement de données d'application SICAT dans un système de fichiers réseau non fiable peut entraîner la perte de données.

Assurez-vous, en coopération avec votre administrateur réseau, que les données d'application SICAT puissent être enregistrées en toute sécurité dans le système de fichiers réseau souhaité.



L'utilisation commune de SICAT Suite et des applications SICAT intégrées avec d'autres appareils d'un réseau d'ordinateurs ou d'un réseau de stockage peut entraîner des risques jusqu'alors inconnus pour les patients, les utilisateurs et d'autres personnes.

Assurez-vous que des règles soient établies au sein de votre établissement afin de déterminer, d'analyser et d'évaluer les risques liés à votre réseau.



Des risques nouveaux peuvent résulter de modifications de votre environnement réseau telles que des modifications de votre configuration réseau, la connexion d'appareils ou de composants supplémentaires à votre réseau, la déconnexion d'appareils ou de composants du réseau, ainsi que la mise à jour ou la mise à niveau d'appareils ou de composants du réseau.

Effectuez une nouvelle analyse des risques du réseau après chaque modification du réseau.

QUALIFICATION DES OPÉRATEURS



L'utilisation de ce logiciel par du personnel non qualifié peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

Seul des opérateurs qualifiés sont autorisés à utiliser ce logiciel.

SÉCURITÉ



Des failles de sécurité dans votre système informatique peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

1. Assurez-vous que votre établissement a adopté des directives permettant de détecter et d'éviter toute menace à la sécurité de votre environnement informatique.
2. Installez un antivirus à jour et exécutez-le.
3. Assurez-vous que les fichiers de définition de l'antivirus soient régulièrement mis à jour.



Un accès non autorisé à votre station de travail peut entraîner un risque pour la confidentialité et l'intégrité de vos données patient.

Limitez l'accès à votre station de travail aux personnes autorisées.



Des problèmes de cybersécurité peuvent permettre un accès non autorisé à vos données patient et entraîner des risques en termes de sécurité et d'intégrité de vos données patient.

Si vous supposez l'existence de problèmes de cybersécurité de votre application SICAT, prenez immédiatement contact avec l'assistance.

INSTALLATION LOGICIELLE



En cas de modification du logiciel, celui-ci risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

1. Ne procédez à aucune modification de l'installation du logiciel.
2. Ne supprimez et ne modifiez aucun composant compris dans le répertoire d'installation du logiciel.



Des supports d'installation endommagés peuvent entraîner l'échec de l'installation.

Manipulez les supports d'installation avec soin et entreposez-les de manière appropriée.



Si votre système ne remplit pas les conditions système requises, le logiciel risque de ne pas démarrer ou de ne pas fonctionner comme prévu.

Vérifiez, avant d'installer le logiciel, que votre système remplit les conditions minimales requises pour le logiciel et le matériel.



ATTENTION

Des autorisations insuffisantes peuvent entraîner l'échec de l'installation ou de la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous de disposer d'autorisations suffisantes sur votre système lorsque vous installez ou mettez à jour le logiciel.

COMMANDES



ATTENTION

Des données de commande incorrectes peuvent entraîner une commande erronée.

Lorsque vous procédez à une commande, assurez-vous que vous sélectionnez et transmettez les données correctes pour cette commande.



ATTENTION

Une commande erronée peut entraîner un traitement erroné.

1. Vérifiez votre commande avant de l'envoyer.
2. Confirmez la planification correcte de votre commande.

DONNÉES DE MOUVEMENT



ATTENTION

L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



ATTENTION

Des appareils inadaptés pour les données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données de mouvement de la mâchoire d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination n'est pas appropriée peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire dont la destination est conforme à l'utilisation des données de mouvement de la mâchoire par SICAT Function.



ATTENTION

L'utilisation d'appareils d'acquisition du mouvement de la mâchoire non pris en charge ou d'appareils d'enregistrement non compatibles peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

N'utilisez que des données de mouvement de la mâchoire qui ont été acquises avec une combinaison supportée d'un appareil d'acquisition du mouvement de la mâchoire (par exemple SICAT JMT*) et d'un appareil de recalage compatible (par exemple SICAT Fusion Bite).



ATTENTION

Une acquisition incorrecte des données de mouvement de la mâchoire et des radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que les données de mouvement de la mâchoire et les radiographies 3D ont été acquises conformément aux instructions des fabricants des appareils. Utilisez le type de corps de référence indiqué.



ATTENTION

Des données de mouvement de la mâchoire qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données de mouvement de la mâchoire correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



ATTENTION

Une intégrité ou une qualité insuffisante des données de mouvement de la mâchoire peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données de mouvement de la mâchoire importées.



ATTENTION

Une qualité, une précision et une résolution insuffisantes des données de mouvement de la mâchoire peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données de mouvement de la mâchoire présentant une qualité, une résolution et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



ATTENTION

Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou une qualité insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec du mécanisme de détection des marqueurs et du corps de référence. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant la détection correcte des marqueurs et du corps de référence.



ATTENTION

Une position, un type et une orientation incorrects du corps de référence peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Après la détection du corps de référence par l'assistant JTM, contrôlez la position, le type et l'orientation corrects du corps de référence en tenant compte des radiographies 3D.



ATTENTION

Un recalage incorrect des données de mouvement de la mâchoire sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données de mouvement de la mâchoire recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

EMPREINTES OPTIQUES



L'utilisation de données autres que des radiographies 3D comme source unique d'informations peut donner lieu à un diagnostic erroné et un traitement inadéquat.

1. Utilisez des radiographies 3D comme source d'informations préférentielles pour le diagnostic et la planification.
2. Utilisez d'autres données, telles que des données d'empreinte optique, uniquement comme sources d'informations auxiliaires.



Des appareils inadaptés pour les empreintes optiques peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

N'utilisez que les données d'empreintes optiques d'appareils qui sont homologués comme dispositifs médicaux.



Des empreintes optiques qui ne correspondent pas au patient et à la date des radiographies 3D peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Assurez-vous que le patient et la date des données d'empreinte optique correspondent au patient et à la date des radiographies 3D représentées.



Une intégrité ou une qualité insuffisante des données d'empreinte optique peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez l'intégrité et la qualité des données d'empreinte optique importées.



Une qualité et une précision insuffisantes des données d'empreinte optique peuvent entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Utilisez uniquement des données d'empreinte optique présentant une qualité et une précision suffisantes pour le diagnostic et la thérapie envisagés.



Des artefacts excessifs, une résolution insuffisante ou des points manquants pour le recalage peuvent entraîner l'échec de la procédure de recalage d'empreintes optiques. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des empreintes optiques et des radiographies 3D permettant un recalage précis.



La sélection, dans le procédé de recalage d'empreintes optiques, de marquages qui ne coïncident pas peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Lorsque vous recalez des données d'empreintes optiques, sélectionnez soigneusement, dans les radiographies 3D et dans les empreintes optiques, des marquages qui coïncident.



ATTENTION

Un recalage incorrect des empreintes optiques sur les radiographies 3D peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Contrôlez que les données d'empreinte optique recalées sont correctement orientées par rapport aux radiographies 3D.

SEGMENTATION



ATTENTION

Des artefacts excessifs ou une résolution insuffisante des radiographies 3D peuvent entraîner l'échec de la procédure de segmentation ou des résultats insuffisants. Des artefacts excessifs dans les radiographies 3D sont par ex. des artefacts de mouvement ou des artefacts métalliques.

N'utilisez que des radiographies 3D permettant une qualité suffisante de la segmentation des structures anatomiques concernées.



ATTENTION

Une qualité insuffisante de la segmentation peut entraîner un diagnostic erroné et un traitement inapproprié.

Vérifiez que la qualité de la segmentation est suffisante pour l'utilisation prévue.

44 PRÉCISION

Le tableau suivant indique les valeurs de précision dans toutes les applications SICAT :

Précision des mesures de distances	< 100 µm
Précision des mesures d'angles	< 1 degré
Précision de la représentation	< 20 µm
Précision de la représentation pour les données de mouvement de la mâchoire	< 0,6 mm

GLOSSAIRE

ADA

American Dental Association (association dentaire américaine)

Application

Les applications SICAT sont des programmes qui font partie de SICAT Suite.

Barre de navigation

La barre de navigation dans la partie supérieure de SICAT Suite contient les icônes principales de SICAT Suite. Lorsqu'un dossier patient est actif, la barre de navigation permet de commuter entre le dossier patient et différentes applications.

Cadres

Dans la vue 3D, des cadres indiquent les positions des vues de coupes 2D.

Dépôt de dossiers patient

Un dépôt de dossiers patient contient des dossiers patient. SICAT Suite enregistre les dépôts de dossiers patient dans des dossiers d'un système de fichiers local ou d'un système de fichiers réseau.

Dossier patient

Un dossier patient contient toutes les radiographies 3D et projets de planification concernant un patient donné. SICAT Suite enregistre les dossiers patient dans des dépôts de données patient.

Empreintes optiques

Une empreinte optique est le résultat d'une acquisition 3D de la surface de dents, de matériaux d'empreinte ou de modèles en plâtre.

Étude

Une étude se compose d'une radiographie 3D et du projet de planification correspondant.

FDI

Fédération Dentaire Internationale

Fenêtre de notification

La fenêtre de notification affiche sur le bord inférieur droit de l'écran des messages relatifs aux procédures terminées.

Fourchette occlusale

Une fourchette occlusale est une plaque à mordre munie de marqueurs radio-opaques sphériques, utilisée par SICAT pour fusionner les données de radiographies 3D avec les données de mouvement de la mâchoire.

Projet de planification

Un projet de planification se compose de données de planification d'une application SICAT basées sur une radiographie 3D.

Radiographie 3D

Une radiographie 3D est une image radiographique volumétrique.

Recalage

Orientation spatiale

Réticules

Les réticules sont des lignes d'intersection avec d'autres vues de coupes.

SICAT JMT+

SICAT JMT+ enregistre les mouvements de la mandibule.

SICAT Portal

SICAT Portal est un site Internet sur lequel vous avez la possibilité, entre autres, de commander des gouttières chez SICAT.

SIXD

Format de fichier pour l'échange d'empreintes optiques.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (Société des ingénieurs du cinéma et de la télévision)

SSI

Format de fichier pour l'échange d'empreintes optiques.

STL

Surface Tessellation Language, format de fichier standard pour l'échange de données de maillage, pouvant être contenues dans les empreintes optiques, par exemple.

INDEX

A

Aperçu général de SICAT Suite	15
Articulation anatomique	168
Assistance	226
Informations de contact	228
Informations produit	229
Outils	228
Ouverture de la fenêtre d'assistance	227
Ouvrir l'aide	43

B

Barre d'outils de flux de travail	90
-----------------------------------	----

C

Calibrage du moniteur	220
Captures d'écran	
Créer des espaces de travail	106
Captures d'écrans	
Créer des vues	120
CEREC	
Valeurs d'articulateur	181
Commande	200
Ajouter des gouttières thérapeutiques au panier	203
Chargement automatique après le redémarrage	212
Contrôler le panier	208
Définir la position thérapeutique	201
Écraser la position thérapeutique	202
Interrompre et poursuivre le chargement	212
SICAT Portal	210
Supprimer la position thérapeutique	201
Transfert de données en arrière-plan	209
Transmission de données par un autre ordinateur	213
Commuter	
Applications	42
Commuter entre les applications	42
Configuration système requise	8

D

Dépôts de dossiers patient	54
Activer un autre dépôt de dossiers patient	58
Ajouter	56
Ouvrir la fenêtre "Dépôts de dossiers patient"	55
Supprimer	60
Désinstallation	235
Données de mouvement	145
Appareils	146
Exporter	171
Importer et enregistrer	148

Sélectionner les relations intermaxillaires statiques ou les mouvements de la mâchoire.	170
Visionner les tracés de mouvements anatomiques	169
Dossiers patient	71
Activer	75
Modifier les attributs	78
Ouvrir à partir de la vue d'ensemble des dossiers patient	79
Ouvrir la fenêtre "Vue d'ensemble des dossiers patient"	72
Rechercher	73
Supprimer	85
Supprimer des radiographies 3D ou des projets de planification	87
Travailler avec des dossiers patient actifs	76
Trier	73

E

Empreintes optiques	158
Importation STL	165
Importer et enregistrer	160
Réutiliser à partir d'autres applications SICAT	166
Espace de travail TMJ	102
Afficher la limite de la segmentation	179
Afficher le mouvement axé sur les condyles	180
Déplacer les points de tracé	176
Fonctions	175
Informations générales	101
Placer le point inter-incisif	177
Utilisation du triangle de Bonwill	178
Valeurs d'articulateur	181
Espaces de travail	98
Adapter	105
Barre d'outils de l'espace de travail	89
Changer	104
Créer des captures d'écran	106
MPR/Radiologie	103
Panorama	100
Réinitialiser	105
TMJ	101
Étape de flux de travail	
Commander	91
Diagnostiquer	91
Préparer	90
Études SICAT Fonction	
Dans la version standalone	82
Exportation de données	196
Exporter des données	198
Ouvrir la fenêtre "Transmettre les données"	197

U

Utilisation conforme	6
Utiliser des codes de bon d'échange	52

V

Valeurs d'articulateur	
Informations générales	181
Relevé avec des condyles invisibles	187
Relevé avec des condyles visibles	185
Version standalone	
Études SICAT Function	82
Versions	
Différences	30
Vue 3D	121
Commuter le type de représentation	126
Configurer	127
Déplacer l'extrait	129
Modifier le sens de vision	122
Types de représentation	124
Vues	107
Barre d'outils de vue	108
Commuter	110
Contraste et luminosité	112
Créer des captures d'écran	120
Déplacer des extraits	114
Déplacer la fenêtre d'examen	117
Faire défiler	115
Masquer et afficher la fenêtre d'examen	118
Maximiser et restaurer	111
Réinitialiser	119
Réticules et cadres	116
Zoomer	114

Z

Zone JMT	169
Gérer les signets	171
Zone panoramique	136
Adapter	142

EXPLICATION DES MARQUAGES



- Attention ! Tenir compte de la documentation associée.



- Observer les indications de la notice d'instruction.



- Fabricant



- Code de lot

Exemple de code de lot :

1020130921

1	2	3	4
---	---	---	---

1 Version du produit au format AB (10 signifie V1.0)

3 Mois de fabrication

2 Année de fabrication

4 Jour de fabrication

ÉTAT: 2017-12-19

CONTACT



FABRICANT

SICAT GMBH & CO. KG

BRUNNENALLEE 6

D-53177 BONN, ALLEMAGNE

WWW.SICAT.COM

CE0197

ASSISTANCE LOCALE

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT

TÉL. : +49 6251 161670

Tous droits réservés. Toute copie de cette notice d'instruction, de parties de cette notice ou de ses traductions est interdite sauf autorisation écrite de SICAT.

Les informations contenues dans ce document étaient correctes à la date d'impression mais sont sujettes à des modifications sans avertissement préalable.

SICAT.

a **Sirona** company