



 **OPTISLEEP**

Version 1.1

Informations d'utilisation et d'entretien



Chère utilisatrice SICAT OPTISLEEP,

cher utilisateur SICAT OPTISLEEP,

Félicitations pour votre nouveau SICAT OPTISLEEP. Nous vous souhaitons de retrouver un bon sommeil et de vous réveiller reposé grâce à SICAT OPTISLEEP ! La fatigue diurne et l'épuisement devraient désormais faire partie du passé.

Votre médecin a fait fabriquer cette gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP spécialement pour vous.

SICAT OPTISLEEP réduit et calme les ronflements et/ou l'apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à moyenne chez les adultes (de 18 ans révolus) pendant le sommeil.

Cette notice vous informe du traitement avec SICAT OPTISLEEP, vous explique son utilisation et vous fournit des consignes importantes pour le nettoyage et l'entretien.

Pour toute question concernant votre gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP, votre dentiste se tient volontiers à votre disposition. N'hésitez pas à consulter notre site web www.optisleep.com spécialement conçu pour les patients.


Votre équipe SICAT OPTISLEEP

LE TRAITEMENT SICAT OPTISLEEP


La gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP fonctionne sur le principe de la protrusion mandibulaire :

La gouttière thérapeutique est portée par le patient dans la bouche pendant le sommeil et maintient le mandibule dans une position thérapeutique légèrement avancée.

Cela conduit à l'élargissement des voies respiratoires et à l'activation simultanée de la musculature de la langue et des tissus mous, ce qui donne une stabilité supplémentaire à la voie respiratoire. Les bruits de ronflements sont ainsi diminués et la voie respiratoire reste ouverte.

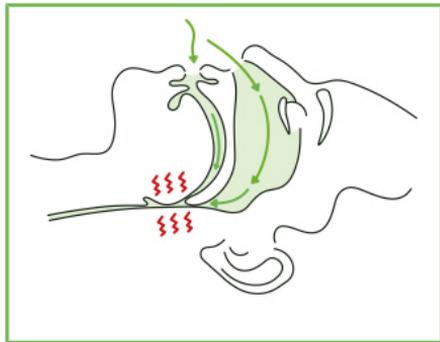

Voie respiratoire bloquée

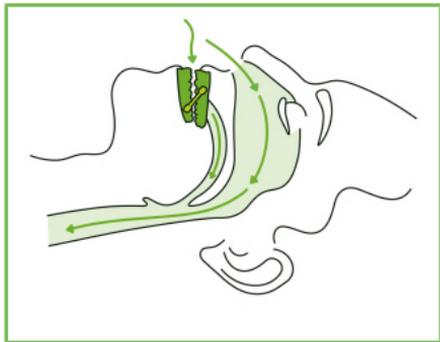

Voie respiratoire libre grâce à **OPTISLEEP**

LA GOUTTIÈRE THÉRAPEUTIQUE SICAT OPTISLEEP

La gouttière thérapeutique a été fabriquée spécialement pour vous et est composée

- d'une gouttière pour le maxillaire et
- d'une gouttière pour la mandibule,

qui sont reliées entre elles par une paire de connecteurs interchangeables. Ils sont disponibles dans des longueurs différentes afin que votre dentiste puisse ajuster le mieux possible la position de la mandibule pendant le déroulement du traitement.



L'UTILISATION DE VOTRE GOUTTIÈRE THÉRAPEUTIQUE SICAT OPTISLEEP



Essayage de la gouttière thérapeutique

Effectuer le premier essai de la gouttière thérapeutique en présence de votre dentiste.

Mise en place de la gouttière thérapeutique

Avant de mettre en place la gouttière thérapeutique, assurez-vous que les connecteurs soient montés correctement.

insérez la gouttière en totalité dans la bouche. Commencez par mettre en place la gouttière de la mandibule puis la gouttière du maxillaire par une légère pression sur les dents. La gouttière s'enclenche sur les dents et doit à présent être bien fixée.

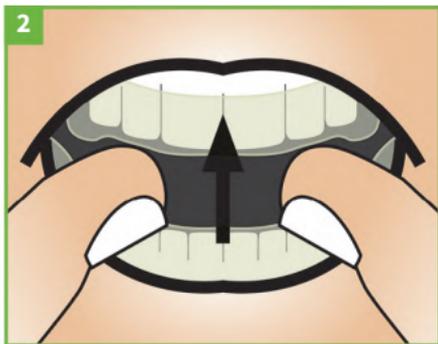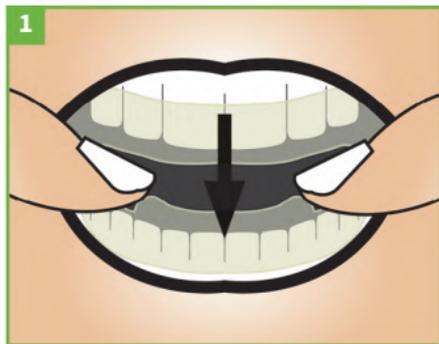


N'essayez pas de forcer en mettant la gouttière en place. Contactez votre dentiste en cas de problèmes avec la mise en place de la gouttière.

Retrait de la gouttière thérapeutique

La gouttière thérapeutique doit pouvoir se détacher de la rangée de dents sans nécessiter trop de force.

Placez vos pouces au niveau des molaires de part et d'autre de la gouttière inférieure et retirez-la de façon uniforme par une légère pression. Retirez ensuite la gouttière supérieure des dents avec précaution. N'utilisez pas les broches de connexion pour désolidariser le rail.

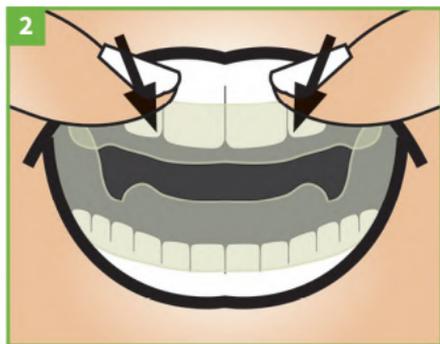

Réglage de la position thérapeutique


La gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP peut être réglée à l'aide de connecteurs de différentes longueurs sur 10 positions de thérapie différentes.

Votre dentiste vous a fourni une gouttière thérapeutique déjà réglée sur votre position thérapeutique. Ne modifiez pas cette position sans concertation avec votre dentiste !

Détacher les connecteurs

Le connecteur est relié à la gouttière du maxillaire et à la gouttière de la mandibule par le biais de broches de fixation. Pour retirer le connecteur, ce dernier doit être **aligné perpendiculairement à la gouttière** afin de déverrouiller la fermeture pour retirer le connecteur. Le connecteur peut uniquement être retiré dans cette position !



Une fois le connecteur placé à la verticale, détachez-le en tirant sur la broche de fixation. Maintenez la gouttière avec l'autre main afin de la stabiliser à hauteur de la broche de fixation.

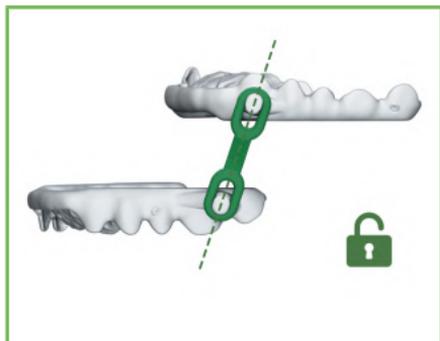

Fixation du connecteur

Le connecteur est fixé à la gouttière du maxillaire et à la gouttière de la mandibule par le biais de broches de fixation.

Pour fixer un connecteur, ce dernier doit s'enclencher dans la broche de fixation de la gouttière. Pour cela, passez le trou ovale du connecteur perpendiculaire à la gouttière sur la broche de fixation par une légère pression. Le connecteur s'enclenche ensuite par un clic.

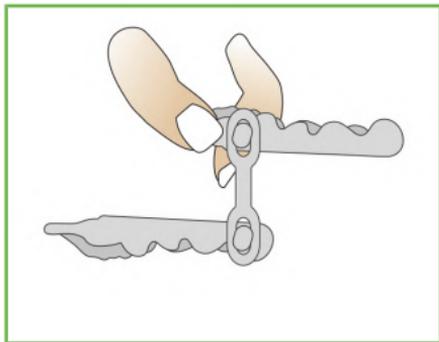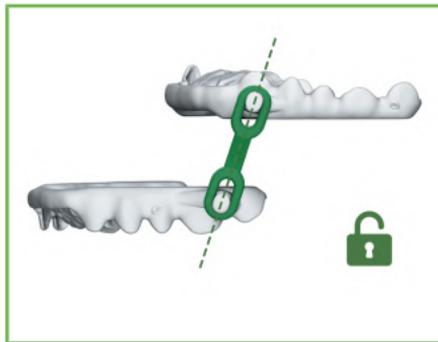

Au moment de la fixation du connecteur, veuillez impérativement à maintenir la gouttière avec l'autre main afin de ne pas surcharger la gouttière.

Il existe différentes versions de rails et de connecteurs, qui ne diffèrent que très peu les uns des autres. Veuillez noter qu'ils ne peuvent pas être combinés entre eux. Veuillez consulter votre médecin pour connaître les connecteurs à utiliser lors d'un éventuel changement afin d'éviter une perte de fonctionnalité de votre gouttière.

Veuillez utiliser les connecteurs SICAT OPTISLEEP V1.1 pour le SICAT OPTISLEEP V1.1.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE GOUÏTIÈRE THÉRAPEUTIQUE SICAT OPTISLEEP

- Brossez-vous toujours les dents minutieusement avant de mettre en place la gouttière thérapeutique. Le tartre peut également se disposer sur la gouttière. Faites-la enlever régulièrement.
- Après l'avoir ôtée, nettoyez votre gouttière thérapeutique soigneusement chaque matin à l'aide d'une brosse à dents souple à l'eau chaude courante. Utilisez cette brosse à dents exclusivement pour nettoyer votre gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP. Vous pouvez nettoyer de temps en temps votre gouttière thérapeutique avec un détergent doux (par ex. un produit de lavage) ou un nettoyeur de prothèse sans oxygène doux.
- Après le nettoyage, conservez votre gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP toujours au sec à température ambiante dans la boîte de rangement prévue à cet effet.
- Protégez la gouttière thérapeutique des rayons directs du soleil et de la chaleur.
- Conservez le site SICAT OPTISLEEP hors de portée des animaux domestiques.
- Retirez la gouttière thérapeutique avant de manger ou de boire afin d'éviter de l'endommager.

Avertissements concernant l'entretien

L'utilisation d'un nettoyeur de prothèse contenant de l'oxygène pourrait endommager durablement le plastique de votre gouttière thérapeutique. L'utilisation d'eau chaude et de dentifrice pourrait provoquer des dommages. De même, l'utilisation de la lumière UV pourrait entraîner des dommages aux matériaux. Même les modifications de la gouttière thérapeutique effectuées de façon autonome peuvent provoquer des dommages ou un risque de blessure. Un nettoyage non conforme peut dans certaines circonstances provoquer l'annulation de la garantie.

Gouttières thérapeutiques endommagées

Contrôlez régulièrement votre gouttière thérapeutique pour vérifier si elle n'est pas endommagée. Les dommages possibles sont entre autres des déformations, fissures, brisures ou pièces détachées.

Une gouttière thérapeutique endommagée ou cassée ne peut plus être utilisée car elle présente un risque de blessure. Si cela devait arriver, veuillez contacter immédiatement votre médecin.

GARANTIE

Votre gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP a été fabriquée individuellement pour vous selon un procédé entièrement numérisé en se basant sur vos images 3D.

Même si la conception et la fabrication numériques de la SICAT OPTISLEEP garantissent une précision extrême, il ne peut être garanti que la gouttière thérapeutique arrête dans tous les cas les ronflements et/ou diminue l'apnée obstructive du sommeil. Nous vous recommandons de faire vérifier régulièrement la gouttière thérapeutique par votre dentiste.

Le fabricant vous accorde une garantie de deux ans (durée de vie totale) sur les éventuels défauts de fabrication et de matériaux de la gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP. Veuillez ne plus utiliser votre gouttière thérapeutique au-delà de sa durée de vie. Rendez-vous sur www.sicat.com pour lire les conditions de garantie et parlez-en à votre médecin.

INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES

Indications

L'utilisation de la gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP est indiquée chez les adultes

- afin de réduire ou atténuer le ronflement et
- réduire ou atténuer l'apnée obstructive du sommeil légère à moyenne

Contre-indications

La gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP ne doit pas être utilisée en cas de :

- apnée centrale du sommeil
- dents déchaussées
- parodontite avancée
- Personnes de moins de 18 ans
- mâchoire édentée
- maladies graves des voies respiratoires

Usages cliniques

SICAT OPTISLEEP est destiné à réduire ou à soulager le ronflement ou l'apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à modérée. On y parvient en plaçant la mâchoire inférieure en position antérieure, ce qui élargit la dimension latérale du pharynx, stabilise l'os hyoïde et le palais mou, étire les muscles de la langue et empêche la mâchoire inférieure de se déplacer vers l'arrière. Cela améliore à son tour la capacité du patient à respirer pendant son sommeil.

Les patients traités avec une gouttière d'avancement mandibulaire (GAM) obtiennent une amélioration générale de leur état de santé. Plusieurs paramètres sont améliorés. L'indice d'apnée-hypopnée (IAH) est réduit, l'observance du traitement peut être augmentée, les thérapies combinées permettent un meilleur traitement en raison d'une plus grande conformité, et une diminution des maladies concomitantes est observée.

Effets secondaires possibles

L'utilisation de gouttières thérapeutiques peut provoquer une salivation accrue. Des douleurs des articulations et muscles temporo-mandibulaires, du palais, des gencives et des dents ainsi que des maux de têtes peuvent survenir de façon passagère.

Il peut arriver que le matin, après avoir retiré SICAT OPTISLEEP, vous constatiez un léger changement de la morsure. En général, cela se résout rapidement. Vous pouvez accélérer la récupération d'une occlusion normale par une simple gymnastique de la mâchoire, la mastication d'un chewing-gum ou autre, ou par l'utilisation d'un entraîneur d'occlusion spécial.

Si vous ressentez de légères douleurs durables, contactez votre dentiste.

Dans certaines circonstances, les conséquences à long terme peuvent être un déplacement des dents ou des modifications de l'occlusion dentaire.

En cas de douleurs vives, de problèmes respiratoires, de nausées, de réactions allergiques ou de mouvements involontaires des dents, retirez immédiatement la gouttière et contactez immédiatement votre dentiste.

Nous recommandons des contrôles réguliers chez votre dentiste !

 **OPTISLEEP**

Votre dentiste vous remet votre gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP dans la boîte de rangement SICAT OPTISLEEP.

Après chaque utilisation, conservez votre gouttière thérapeutique nettoyée et séchée dans la boîte de rangement SICAT OPTISLEEP.

Veuillez contacter votre dentiste concernant une mise au rebut adaptée de votre SICAT OPTISLEEP.

Si des faits graves devaient survenir en relation avec le produit (de graves blessures, par exemple), ceux-ci doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente.

Pour toute question ou remarque concernant votre gouttière thérapeutique SICAT OPTISLEEP, consultez notre site Internet :

WWW.OPTISLEEP.COM



NOTICES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTICES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTICES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



WWW.OPTISLEEP.COM

CABINET / INFO



SICAT GmbH & Co. KG - Friesdorfer Str. 131-135 - 53175 Bonn, Allemagne

10470FR | 500207 | DD32IFU013 - 2022-03-29