

KURZ UND KOMPAKT

DAS WICHTIGSTE ZU SICAT **OPTIGUIDE**
UND SICAT **DIGITALGUIDE**



WANN	WIE	NICHT GEEIGNET FÜR
<ul style="list-style-type: none">✓ Keine oder wenige Metallartefakte erwartet✓ Ausreichende Restbeziehung zur Abstützung der Schablone✓ Ausreichend gesunde Restbeziehung für eine exakte CEREC Registrierung	<ul style="list-style-type: none">✓ Scannen Sie mindestens $\frac{3}{4}$ des Zahnbogens✓ Keine geschlossene Okklusion während des Röntgenscans	<ul style="list-style-type: none">✗ Vollständig zahnlose Kiefer✗ Vorwiegend zahnfleischgestützte Bohrschablonen✗ Scans mit zu erwartenden, ausgedehnten Metallartefakten.



Scannen Sie Teile des Zahnfleisches, um die Registrierung besser beurteilen zu können!



Scannen Sie den Patienten im Zweifelsfall mit einer Aufbissplatte und wählen Sie den **CLASSICGUIDE** Workflow, falls nötig!

SICAT

SUPPORT

SGL@SICAT.COM

T +49 228 286 206 - 620

HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN
DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

DD30IFU201


STAND:
2021-02-08

DO'S




Korrekte optische Registrierung


DON'TS

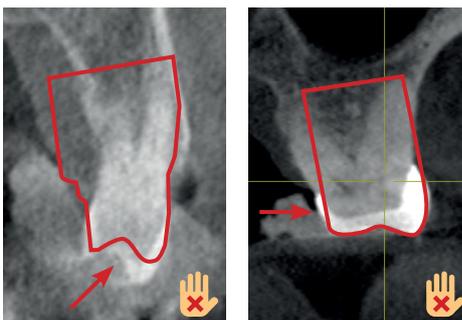

Fehlerhafte optische Registrierung

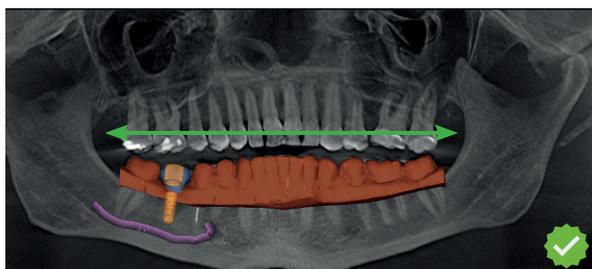

Hinreichender optischer Scan

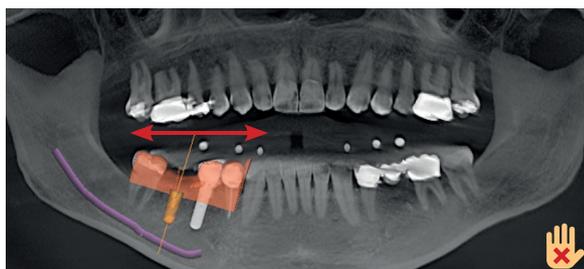

Unzureichender optischer Scan



Vernachlässigbare Metallartefakte



Ausgedehnte Metallartefakte