



IMPLANTATDATENBANK AKTUALISIEREN

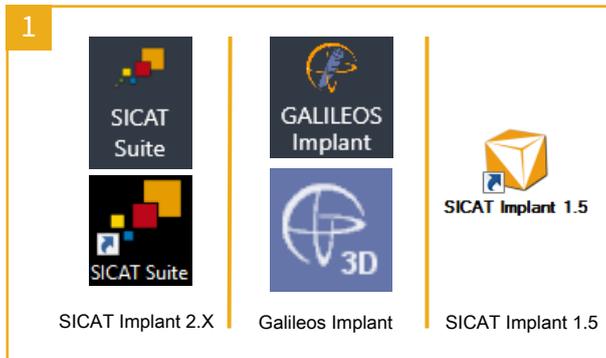


Prüfen Sie, welche Software Sie verwenden:
SICAT Implant 2.X erkennen Sie an den Symbolen für SICAT Suite in Sidexis 4 oder als eigene Anwendung auf der linken Seite.
Galileos Implant erkennen Sie an den Symbolen für Galileos Implant in Sidexis 4 oder in SIDEXIS XG in der Mitte.
SICAT Implant 1.5 erkennen Sie an dem Symbol auf der rechten Seite.

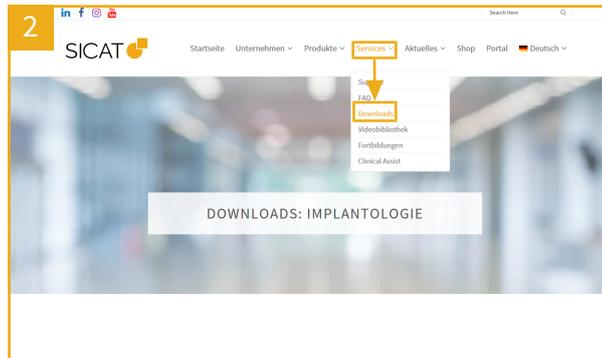

Klicken Sie auf der SICAT-Webseite <https://www.sicat.de> unter **Services** auf **Downloads**.
 Klicken Sie auf **IMPLANTOLOGIE**.

SICAT Implant 2.X:

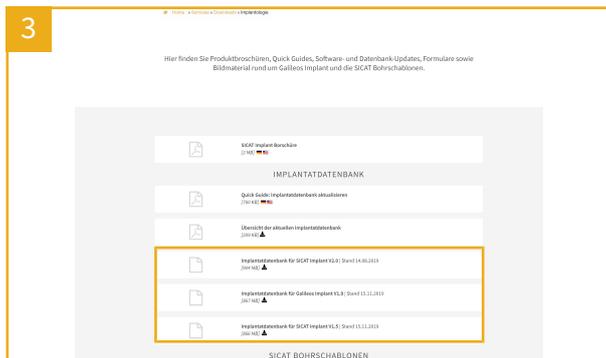


Scrollen Sie zum Bereich **IMPLANTATDATENBANK**. Klicken Sie bei dem Eintrag, der zu Ihrer Software passt, auf das Downloadsymbol und speichern Sie die Datei. Doppelklicken Sie auf die gespeicherte Datei.



Die Schritte 4 bis 5 beziehen sich nur auf SICAT Implant 2.X. Wenn Sie Galileos Implant oder SICAT Implant 1.5 nutzen, folgen Sie den Schritten 2 bis 8.
 Klicken Sie im Willkommensfenster auf **Aktualisieren**.


Galileos Implant und SICAT Implant 1.5:

SICAT Implant 2.X:

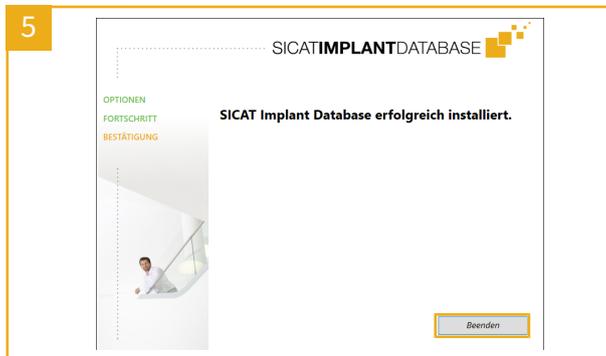


Warten Sie, bis das Installationsprogramm das Fenster mit dem Fortschrittsbalken schließt und klicken Sie im letzten Fenster auf **Beenden**.

Galileos Implant und SICAT Implant 1.5:

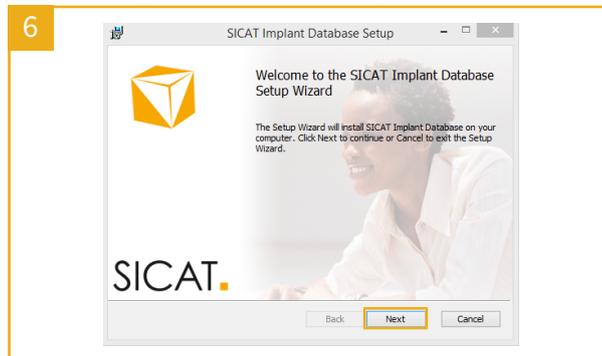

Klicken Sie im Willkommensfenster auf **Next**.

Galileos Implant und SICAT Implant 1.5:

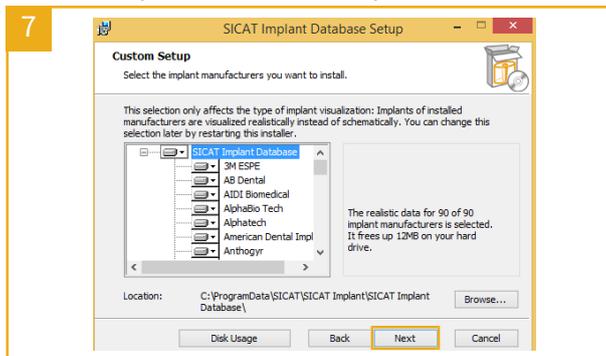

Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und auf **Next** klicken. Klicken Sie erneut auf **Next** und im nächsten Fenster auf **Install**.



Warten Sie, bis das Installationsprogramm das Fenster mit dem Fortschrittsbalken schließt und klicken Sie im letzten Fenster auf **Finish**.

i Für eine umfassende Produktinformation nutzen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

SICAT

HERSTELLER
 SICAT GMBH & CO. KG
 FRIESDORFER STR. 131-135
 53175 BONN, DEUTSCHLAND
 WWW.SICAT.COM

CE 0197

SUPPORT
 WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DX2XQUG001
 STAND: 2021-02-26
 SEITE: 1 / 1