


## Pedido de SICAT OPTISLEEP en base a los datos de las superficies

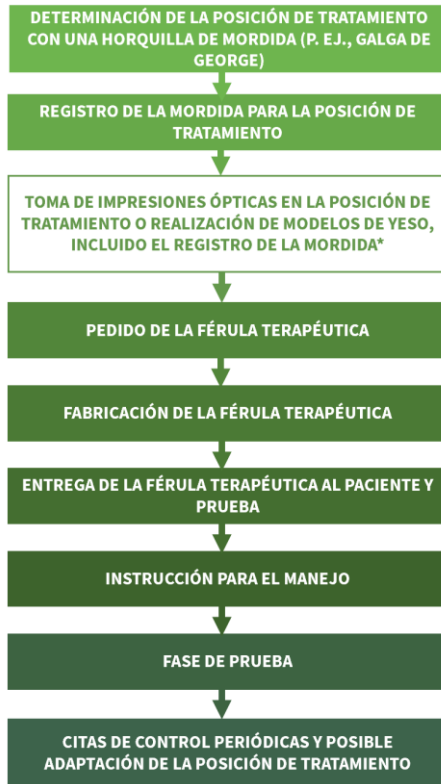

### \*Realización de una exploración intraoral digital

Su escáner intraoral le permite realizar una **exploración del maxilar inferior completo**, una **exploración del maxilar superior completo** y una **exploración de la mordida bucal con horquilla de mordida** (posición de tratamiento), a ser posible, por ambos lados.

**Nota:** El material de registro en la horquilla de mordida no debe cubrir las superficies dentales bucales, de modo que el software del escáner pueda correlacionar adecuadamente la mordida. **En caso necesario, elimine el material excedente o que altere el procedimiento.**