

Commande du SICAT OPTISLEEP sur la base des données de surface



* Prise de scan intra-oral numérique

Réalisez un **scan de la mandibule complète**, un **scan du maxillaire complet** et un **scan de l'occlusion buccale avec fourchette occlusale** (position de traitement) avec votre scanner intra-oral, si possible des deux côtés.

Remarque : le matériau d'enregistrement sur la fourchette occlusale ne doit pas recouvrir la face buccale des dents, afin que le logiciel de scannage puisse corréliser correctement l'occlusion. **Le cas échéant, retirez le matériau gênant ou excédentaire.**