

Ordinazione di SICAT OPTISLEEP in base ai dati ottenuti dalle scansioni



*Acquisizione di scansioni intraorali digitali

Eseguire con lo scanner intraorale una **scansione dell'intera mandibola**, una **scansione dell'intera mascella superiore** e una **scansione del morso con forchetta occlusale** (posizione di trattamento), possibilmente da entrambi i lati.

Nota: Affinché il software di scansione possa correlare il morso correttamente, il materiale per la registrazione da applicare sulla forchetta occlusale non dovrebbe coprire le superfici buccali dei denti. **Rimuovere eventuale materiale di disturbo o in eccesso.**