


表面データに基づく SICAT OPTISLEEP の注文

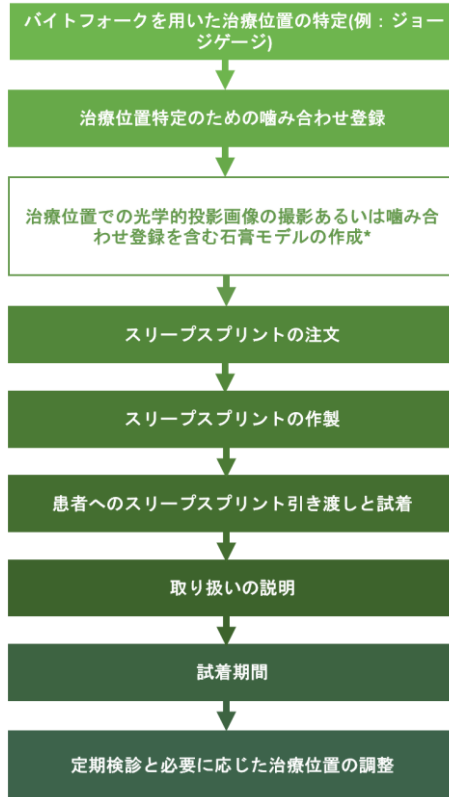

*デジタル口腔内スキャンの撮影

口腔内スキャナーを用いて下顎全体のスキャン、上顎全体のスキャン、さらに可能であれば両側のバイトフォーク(治療位置)を含む頬側咬合のスキャンを作製してください。

注記: スキャナーソフトウェアが咬合を正確に把握できるよう、バイトフォーク上の印象材が頬側の歯の表面を覆わないようにしてください。必要に応じて障害になる、または過剰な印象材を除去してください。



メーカー

SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, ドイツ
WWW.SICAT.COM

文書ID : Addendum-JA-(DD32IFU004-
2022-03-28)-2024-01-08
取扱説明書 :
DD32IFU004-2022-03-28

SICAT 