

Bestelling van de SICAT OPTISLEEP op basis van de oppervlaktegegevens



*Maken van digitale intraorale scans

Maak met uw intraorale scanner een **scan van de volledige onderkaak**, een **scan van de volledige bovenkaak** en een **scan van de buccale beet met bijtvork** (behandelingspositie) indien mogelijk aan beide zijden.

Aanwijzing: Het registratiemateriaal op de bijtvork mag de buccale tandvlakken niet bedekken. Alleen zo kan de scannersoftware de beet correct correleren. **Verwijder eventueel storend of overtollig materiaal.**