


## Comanda SICAT OPTISLEEP pe baza amprentelor optice

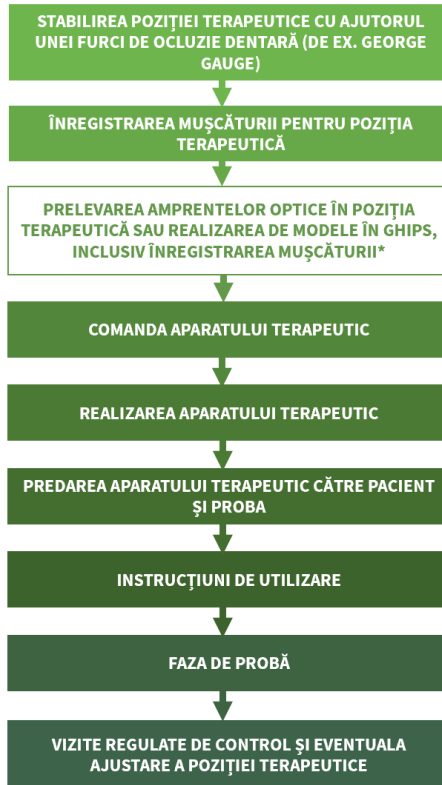

### \*Înregistrarea scanărilor intraorale digitale

Folosiți scannerul intraoral pentru a efectua o **scanare a întregului maxilar inferior**, o **scanare a întregului maxilar superior** și o **scanare a mușcăturii bucale cu furca de ocluzie dentară** (poziția terapeutică) pe ambele părți, dacă este posibil.

**Observație:** Materialul de înregistrare de pe furca de ocluzie dentară nu trebuie să acopere suprafețele dentare bucale, astfel încât software-ul scannerului să poată corela corect mușcătura. **Dacă este necesar, îndepărtați orice material perturbator sau în exces.**