

Заказ SICAT OPTISLEEP на основе данных о поверхности



*Получение интраоральных цифровых снимков

С помощью интраорального сканера выполните **сканирование всей нижней челюсти, всей верхней челюсти и буккального прикуса с прикусной вилкой** (положение при лечении) по возможности с обеих сторон.

Указание: регистрационный материал на прикусной вилке **не должен закрывать** буккальную поверхность зубов, чтобы программное обеспечение сканера могло правильно воссоздать прикус. **При необходимости удалите излишки массы или мешающий материал.**