

BESTELLUNG DER SICAT OPTISLEEP MIT DIGITALEN INTRAORALSCANS

Schritt 1: Bestimmen der Behandlungsposition

Mit einer Bissgabel, wie z.B. dem George Gauge, können Sie die maximale Protrusion des Unterkiefers messen und darauf basierend eine Behandlungsposition festlegen.

Schritt 2: Aufnehmen digitaler Intraoralscans

Fertigen Sie die folgenden Aufnahmen mit Ihrem Intraoralscanner an:

- Scan des vollständigen Unterkiefers
- Scan des vollständigen Oberkiefers
- Scan des bukkalen Bisses mit Bissgabel (Therapieposition) - **auf beiden Seiten, sofern die verwendete Software dies zulässt**

Hinweis: Das Registrierematerial auf der Bissgabel sollte die bukkalen Zahnflächen **nicht** bedecken, damit die Scannersoftware den Biss korrekt korrelieren kann. Entfernen Sie gegebenenfalls störendes oder überschüssiges Material.

Schritt 3: Prüfen der optischen Scans

Stellen Sie sicher, dass die optischen Scans vollständig und frei von Artefakten sind und keine Löcher aufweisen.


Hinweis: SICAT benötigt nutzbare Hinterschnittbereiche, um den Halt der SICAT OPTISLEEP zu gewährleisten. Deshalb unbedingt die Schleimhautübergänge mitscannen, ebenso wie die kompletten distalen Zähne.

Schritt 4: Bestellformular ausfüllen

Füllen Sie das patientenindividuelle Bestellformular aus, das Sie auf der **SICAT Homepage** unter **Service > Downloads > Schlafmedizin** finden.

Schritt 5: Bestellung im SICAT Portal durchführen

1. Öffnen Sie die Internetseite <https://portal.sicat.com> in einem Webbrowser.
2. Falls Sie noch **kein SICAT Portal-Konto** haben, klicken Sie auf den Link **Als neuer Benutzer registrieren** und folgen Sie den Anweisungen. Falls Sie bereits über ein **SICAT Portal-Konto** verfügen, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im **SICAT Portal** an.
3. Klicken Sie auf dem Dashboard auf **Datei-Upload:**

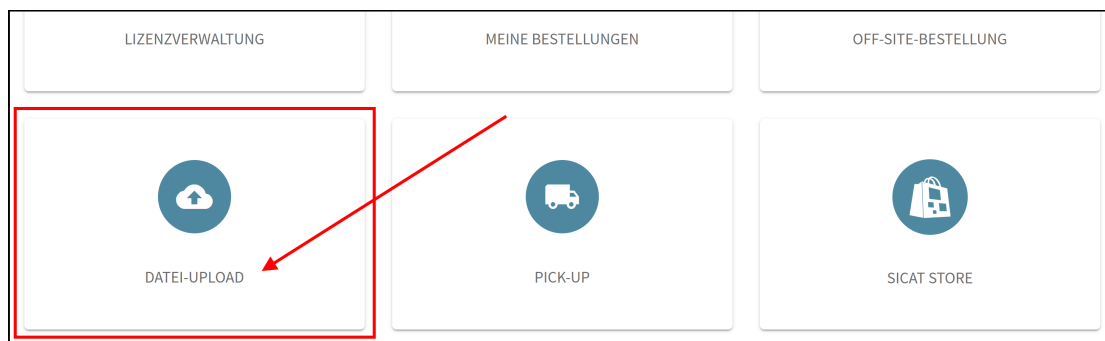

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

THERAPIESCHIENEN-SUPPORT

TELEFON: +49 228 286206600

FAX: +49 228 286206971

E-MAIL: SUPPORT@SICAT.COM



DD32QUG012

STAND: 2023-04-25

SEITE: 1 / 2

4. Wählen Sie im Bereich **Art der Daten** unter **Informationen zum Upload** die Option **Sonstige Daten**:

1 Art der Daten

Informationen zum Upload

ZUSÄTZLICHE DATEN FÜR EXISTIERENDE BESTELLUNG OPTIGUIDE CLASSICGUIDE DIGITALGUIDE

CLINICALASSIST SONSTIGE DATEN

WEITER

5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Erfassen Sie im Bereich **Zusätzliche Informationen** unter **Hinweise und Anmerkungen** unbedingt den Patientennamen:

Art der Daten

2 Zusätzliche Informationen

Hinweise und Anmerkungen
Hinweise und Anmerkungen zu Ihrem Datei-Upload
Ihre Hinweise und Anmerkungen an SICAT

Bitte unbedingt den vollständigen Namen des Patienten angeben

OPTISLEEP für Patient [Vorname][Nachname]

ZURÜCK WEITER

7. Klicken Sie auf **Weiter**.
8. Erstellen Sie ein ***zip-Archiv**, das die folgenden Dateien enthält: **Digitale Intraoralscans von Oberkiefer und Unterkiefer in Behandlungsposition (.stl-Dateien)** und digitales **PDF-Bestellformular** (patientenindividuell erstellt).
Wichtiger Hinweis: Es ist **nicht** möglich, einzelne Dateien separat hochzuladen. Um mehrere Dateien an SICAT zu übermitteln, erstellen Sie **vor dem Hochladen bitte ein *zip-Archiv**.
9. Klicken Sie im Bereich **Dateiauswahl und Upload** auf die Schaltfläche **Datei auswählen**, um ein *zip-Archiv auf Ihrem Rechner auszuwählen:

3 Dateiauswahl und Upload

Erstellen Sie ein *zip-Archiv mit:
-Digitalen Intraoralscans
-Digitalem Bestellformular

Datei auswählen
Bitte wählen Sie die Datei auf Ihrem Computer aus, die Sie hochladen möchten.
Um mehr als eine Datei hochzuladen, erstellen Sie bitte ein *zip-Archiv.

DATEI AUSWÄHLEN Klicken Sie auf die Schaltfläche oder ziehen Sie eine Datei in dieses Feld

*zip-Archiv auswählen

ZURÜCK JETZT HOCHLADEN

10. Klicken Sie auf **Jetzt hochladen**.
- ▶ Die eingegebenen Informationen und das ausgewählte *zip-Archiv werden an SICAT gesendet.
11. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im **SICAT Portal**, um Ihre Bestellung abzuschließen.
- ▶ Sie erhalten eine Bestellbestätigung per E-Mail und können Ihre Bestellung im **SICAT Portal** über **Dashboard > Meine Bestellungen** einsehen.

