

AKTUALISIERUNG ODER NEUINSTALLATION DER SICAT SUITE V2.0.40 IN SIDEXIS 4

Diese Kurzanleitung gilt für alle SICAT Suite-Applikationen. Umfassende Produktinformationen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen.

Sie erfahren wie Sie die SICAT Suite als SIDEXIS 4-Modul aktualisieren können und wie Sie die SICAT Suite V2.0.40 als SIDEXIS4-Modul neu installieren können.

Wie erhalte ich die SICAT Suite V2.0.40?



Was ist das SICAT Portal?

Das SICAT Portal ist die zentrale passwortgeschützte Kundenwebsite von SICAT.

Folgende Funktionen stehen Ihnen im SICAT Portal zur Verfügung:

- SICAT Suite herunterladen
- Voucher einlösen
- Abonnements verwalten
- Bestellungen von Bohrschablonen und Therapieschienen aufgeben und einsehen
- Verbrauchsmaterialien im SICAT Store kaufen

Wichtiger Hinweis: Die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung im SICAT Portal verwenden, wird für die Zustellung wichtiger Informationen genutzt. Bewahren Sie die E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort bitte sorgfältig auf, da Sie sich nur mit diesen Daten in Ihr SICAT Portal Konto einloggen können.

Wie melde ich mich im SICAT Portal an?

1. Öffnen Sie das **SICAT Portal** (www.portal.sicat.com).
2. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein.
3. **Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen:** Klicken Sie auf den Link **Als neuer Benutzer registrieren** und geben Sie Ihre Daten ein. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail von SICAT, deren Erhalt Sie bestätigen müssen bevor Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im SICAT Portal anmelden und die Einrichtung Ihres SICAT Portal Konto abschließen können.

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG044
STAND: 2024-06-19
SEITE: 1 / 3

Wie erhalte ich die SICAT Suite Installationsdatei?

1. Öffnen Sie das SICAT Portal (www.portal.sicat.com) und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie auf der Startseite (Dashboard) auf **Download**.
3. Um die benötigte **zip-Datei** herunterzuladen, klicken Sie auf **SICAT Suite V2.0.40 herunterladen**

Die zip-Datei wird auf Ihrem Rechner gespeichert.

Was muss ich beachten bevor ich die SICAT Suite aktualisiere?

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Um die SICAT Suite V2.0.40 zu nutzen, benötigen Sie die **SIDEXIS 4 Version 4.3.1 oder höher**.
- Schließen Sie SIDEXIS 4, bevor Sie eine Aktualisierung der SICAT Suite durchführen.
- Schließen Sie alle Bestellungen in der SICAT Suite ab, bevor Sie eine Aktualisierung durchführen.
Nicht abgeschlossene Bestellungen im Warenkorb gehen bei einer Aktualisierung verloren!

Wie installiere ich die SICAT Suite V2.0.40 als Sidexis-Modul?

1. Stellen Sie sicher, dass Sie SIDEXIS 4 beendet haben.
2. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
3. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
4. Um die SICAT Suite als SIDEXIS 4-Modul zu installieren, wählen Sie den Installations-Typ **Arbeitsrechner Installation** im SICAT Suite-Setup.



SICAT Suite-Setup: Auswahl des Installationstyps für eine Installation als SIDEXIS 4-Modul

Wenn Sie die **SICAT Suite als Modul in SIDEXIS 4** nutzen, werden Ihre Patientendaten automatisch in der Datenbank von SIDEXIS 4 verwaltet und Sie müssen auf der Seite **Auswahl des Installationstyps** im SICAT Suite-Setup nicht zwischen lokaler und serverbasierter Patientendatenhaltung wählen.

SICAT

HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU044

STAND: 2024-06-19

SEITE: 2 / 3

Nur bei einer Neuinstallation:

Aktivieren Sie während der Installation im Schritt **Optionen** im **SICAT Suite Installer** die Option „**Ich möchte die SICAT Suite mit SIDEXIS nutzen**“:



SICATSUITE

EINFÜHRUNG
LIZENZVEREINBARUNG
OPTIONEN
FORTSCHRITT
BESTÄTIGUNG

Wo möchten Sie die Software installieren ?

C:\Program Files\SICAT\SICAT Suite Durchsuchen...

Standardeinstellungen

Ich möchte die SICAT Suite mit SIDEXIS nutzen

Verknüpfung auf dem Desktop erstellen

Neue Gruppe für die SICAT Suite im Startmenü erstellen

Abbrechen < Zurück Installieren >

SICAT Suite-Installer: Option für Nutzung mit SIDEXIS auswählen

Wie wirkt sich die Aktualisierung auf die vorhandenen Lizenzen aus?

Sie können Ihre Lizenzen ohne Einschränkung weaternutzen.

Kann ich die SICAT Suite auch ohne Lizenzen nutzen?

Sie benötigen nicht zwingend eine Lizenz. Ist keine Lizenz auf Ihrem Rechner vorhanden, können Sie vorhandene Planungsdaten im so genannten **Viewer-Modus** ansehen.

Im Viewer-Modus können Sie **keine Planungen durchführen** und **keine Volumina ohne Planungsdaten** öffnen. Um Planungen durchführen zu können, muss auf Ihrem Rechner eine **Vollversions-Lizenz** vorhanden sein.

Wie erhalte ich Lizenzen für die SICAT Suite-Applikationen?

Um eine Lizenz zu erhalten, sind folgende Schritte notwendig:

1. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort, um einen Voucher-Code zu erhalten.
2. Öffnen Sie das **SICAT Portal** (www.portal.sicat.com).
3. Melden Sie sich im **SICAT Portal** an. Siehe Abschnitt *Wie melde ich mich im SICAT Portal an?*
4. Klicken Sie auf der Startseite (Dashboard) auf **Voucher einlösen**, geben Sie Ihren Voucher-Code ein und folgen Sie den Anweisungen.

Sie werden automatisch zur Konfiguration von **SICAT Smart** weitergeleitet.

SICAT

HERSTELLER
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU044
STAND: 2024-06-19
SEITE: 3 / 3