

AKTUALISIERUNG ODER NEUINSTALLATION DER SICAT SUITE V2.0.40 IN SIDEXIS 4

Diese Kurzanleitung gilt für alle SICAT Suite-Applikationen. Umfassende Produktinformationen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen.

Sie erfahren wie Sie die SICAT Suite als SIDEXIS 4-Modul aktualisieren können und wie Sie die SICAT Suite V2.0.40 als SIDEXIS4-Modul neu installieren können.

Wie erhalte ich die SICAT Suite V2.0.40?



Was ist das SICAT Portal?

Das SICAT Portal ist die zentrale passwortgeschützte Kundenwebsite von SICAT.

Folgende Funktionen stehen Ihnen im SICAT Portal zur Verfügung:

- SICAT Suite herunterladen
- Lizenzen einlösen
- Lizenzen verwalten
- Bestellungen von Bohrschablonen und Therapieschienen aufgeben und einsehen
- Verbrauchsmaterialien im SICAT Store kaufen

Wichtiger Hinweis: Die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung im SICAT Portal verwenden, wird für die Zustellung wichtiger Informationen genutzt. Bewahren Sie die E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort bitte sorgfältig auf, da Sie sich nur mit diesen Daten in Ihr SICAT Portal Konto einloggen können.

Wie melde ich mich im SICAT Portal an?

1. Öffnen Sie das **SICAT Portal** (www.portal.sicat.com).
2. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein.
3. **Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen:** Klicken Sie auf den Link **Als neuer Benutzer registrieren** und geben Sie Ihre Daten ein. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail von SICAT, deren Erhalt Sie bestätigen müssen bevor Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im SICAT Portal anmelden und die Einrichtung Ihres SICAT Portal Konto abschließen können.

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG044
STAND: 2022-03-25
SEITE: 1 / 4

Wie erhalte ich die SICAT Suite Installationsdatei?

1. Öffnen Sie das SICAT Portal (www.portal.sicat.com) und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie auf der Startseite (Dashboard) auf **Download**.
3. Um die benötigte **zip-Datei** herunterzuladen, klicken Sie auf **SICAT Suite V2.0.40 herunterladen**

Die zip-Datei wird auf Ihrem Rechner gespeichert.

Was muss ich beachten bevor ich die SICAT Suite aktualisiere?

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Um die SICAT Suite V2.0.40 zu nutzen, benötigen Sie die **SIDEXIS 4 Version 4.3.1 oder höher**.
- Schließen Sie SIDEXIS 4, bevor Sie eine Aktualisierung der SICAT Suite durchführen.
- Schließen Sie alle Bestellungen in der SICAT Suite ab, bevor Sie eine Aktualisierung durchführen.
Nicht abgeschlossene Bestellungen im Warenkorb gehen bei einer Aktualisierung verloren!

Wie installiere ich die SICAT Suite V2.0.40 als Sidexis-Modul?

1. Stellen Sie sicher, dass Sie SIDEXIS 4 beendet haben.
2. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
3. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
4. Um die SICAT Suite als SIDEXIS 4-Modul zu installieren, wählen Sie den Installations-Typ **Arbeitsrechner Installation** im SICAT Suite-Setup.



SICAT Suite-Setup: Auswahl des Installationstyps für eine Installation als SIDEXIS 4-Modul

Wenn Sie die **SICAT Suite als Modul in SIDEXIS 4** nutzen, werden Ihre Patientendaten automatisch in der Datenbank von SIDEXIS 4 verwaltet und Sie müssen auf der Seite **Auswahl des Installationstyps** im SICAT Suite-Setup nicht zwischen lokaler und serverbasierter Patientendatenhaltung wählen.

SICAT

HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG044

STAND: 2022-03-25

SEITE: 2 / 4

Nur bei einer Neuinstallation:

Aktivieren Sie während der Installation im Schritt **Optionen** im **SICAT Suite Installer** die Option „**Ich möchte die SICAT Suite mit SIDEXIS nutzen**“:



SICAT Suite-Installer: Option für Nutzung mit SIDEXIS auswählen

Wie wirkt sich die Aktualisierung auf die vorhandenen Lizenzen aus?

Sie können Ihre Vollversions- und Viewer-Lizenzen ohne Einschränkung weaternutzen.

Kann ich die SICAT Suite auch ohne Lizenzen nutzen?

Sie benötigen nicht zwingend eine Lizenz. Ist keine Lizenz auf Ihrem Rechner vorhanden, können Sie vorhandene Planungsdaten im so genannten **Viewer-Modus** ansehen.

Im Viewer-Modus können Sie **keine Planungen durchführen** und **keine Volumina ohne Planungsdaten** öffnen. Um Planungen durchführen zu können, muss auf Ihrem Rechner eine **Vollversions-Lizenz** vorhanden sein.

SICAT 

 HERSTELLER
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

€0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG044
STAND: 2022-03-25
SEITE: 3 / 4

Wie erhalte ich Lizenzen für die SICAT Suite-Applikationen?

Um eine Lizenz zu erhalten, sind folgende Schritte notwendig:

1. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort.
2. Generieren Sie mit dem erhaltenen Voucher-Code einen Lizenzschlüssel im SICAT Portal.
3. Fügen Sie den Lizenzschlüssel zu Ihrem Aktivierungsschlüssel hinzu.
4. Aktivieren Sie Ihren Aktivierungsschlüssel in der SICAT Suite.

Detaillierte Informationen zum Thema **Lizenzen** finden Sie im Kapitel **Lizenzen** in den Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen.

Falls in Ihrem Land Abonnements für die SICAT Suite-Applikationen verfügbar sind, erhalten Sie dazu separate Informationen.

Wo finde ich die Gebrauchsanweisungen auf der SICAT Homepage?

1. Sie finden die Gebrauchsanweisungen auf www.sicat.com/suitemanuals.
2. Alternativ: SICAT Webseite (www.sicat.com) > Services > Download > Handbücher

Wo finde ich nach der Installation die Gebrauchsanweisungen als PDF-Datei in SIDEXIS 4?

1. Öffnen Sie **SIDEXIS 4**.
2. Klicken Sie auf das Symbol **Hilfe** in der Menüleiste.
3. Klicken Sie auf die gewünschte Gebrauchsanweisung.

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG044
STAND: 2022-03-25
SEITE: 4 / 4