

NEUINSTALLATION DER SICAT SUITE V2.0.40

Diese Kurzanleitung gilt für alle SICAT Suite-Applikationen. Umfassende Produktinformationen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen.

Sie erfahren wie und mit welchen Optionen Sie die SICAT Suite V2.0.40 als Standalone-Version neu installieren.

Wie werden Ihre Patientendaten in der SICAT Suite V2.0.40 verwaltet?

Seit der SICAT Suite V2.0.40 werden die Patientendaten in einer Patientendatenbank verwaltet, die von mehreren Benutzern gleichzeitig genutzt werden kann.

Damit keine Patientendaten verloren gehen, wird ein Datensatz beim Öffnen für andere Benutzer zur Bearbeitung gesperrt. Andere Benutzer können den bereits geöffneten Datensatz nur zur Ansicht öffnen.

Wie können mehrere Benutzer die Patientendatenbank nutzen?

Damit mehrere Benutzer die Patientendatenbank nutzen können, müssen die genutzten Rechner über ein Netzwerk miteinander kommunizieren.

Innerhalb des Netzwerks wird ein Rechner als Server für die Patientendatenbank eingerichtet. Die anderen Rechner verbinden sich anschließend über das Netzwerk mit der Patientendatenbank auf dem Server.

Wird das Netzwerk automatisch eingerichtet?

Die Einrichtung des Netzwerks muss erfolgreich abgeschlossen sein, bevor Sie die SICAT Suite innerhalb Ihres Netzwerks installieren und nutzen können. Gegebenenfalls müssen Sie dafür die Hilfe eines Technikers in Anspruch nehmen.

Kann ich die SICAT Suite auch ohne Netzwerk nutzen?

Ja, Sie können die SICAT Suite V2.0.40 auch als Einzelplatz-Installation nutzen. In diesem Fall wird die neue Patientendatenbank auf dem gleichen Rechner installiert, auf dem Sie anschließend mit den Patientendaten arbeiten.

Wie erhalte ich die SICAT Suite V2.0.40?



SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG040
STAND: 2022-03-25
SEITE: 1 / 6

Was ist das SICAT Portal?

Das SICAT Portal ist die zentrale passwortgeschützte Kundenwebsite von SICAT.

Folgende Funktionen stehen Ihnen im SICAT Portal zur Verfügung:

- SICAT Suite herunterladen
- Lizenzen einlösen
- Lizenzen verwalten
- Bestellungen von Bohrschablonen und Therapieschienen aufgeben und einsehen
- Verbrauchsmaterialien im SICAT Store kaufen

Wichtiger Hinweis: Die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung im SICAT Portal verwenden, wird für die Zustellung wichtiger Informationen genutzt. Bewahren Sie die E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort bitte sorgfältig auf, da Sie sich nur mit diesen Daten in Ihr SICAT Portal Konto einloggen können.

Wie melde ich mich im SICAT Portal an?

1. Öffnen Sie das **SICAT Portal** (www.portal.sicat.com).
2. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein.
3. **Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen:** Klicken Sie auf den Link **Als neuer Benutzer registrieren** und geben Sie Ihre Daten ein. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail von SICAT, deren Erhalt Sie bestätigen müssen bevor Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im SICAT Portal anmelden und die Einrichtung Ihres SICAT Portal Konto abschließen können.

Wie erhalte ich die SICAT Suite Installationsdatei?

1. Öffnen Sie das SICAT Portal (www.portal.sicat.com) und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie auf der Startseite (Dashboard) auf **Download**.
3. Um die benötigte **zip-Datei** herunterzuladen, klicken Sie auf **SICAT Suite V2.0.40 herunterladen**

Die zip-Datei wird auf Ihrem Rechner gespeichert.

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG040

STAND: 2022-03-25

SEITE: 2 / 6

Was muss ich vor der Installation beachten?

Bei der Installation der SICAT Suite V2.0.40 als Standalone-Version müssen Sie festlegen **wo Sie Ihre Patientendaten verwalten möchten**.

Sie können zwischen folgenden **zwei Optionen** wählen:

- **Lokale Patientendatenhaltung:** Die Patientendatenbank wird zusammen mit der SICAT Suite und der SICAT Implant Database auf dem Rechner installiert, auf dem Sie anschließend Ihre Patientendaten speichern und verwalten. Wählen Sie als Installationstyp die **Einzelplatz-Installation**.
- **Serverbasierte Patientendatenhaltung:** Im ersten Schritt wird die Patientendatenbank auf einem Server-Rechner installiert. Wählen Sie als Installationstyp die **Server-Installation**. Im zweiten Schritt werden die SICAT Suite und die SICAT Implant Database auf einem oder mehreren Arbeitsrechnern installiert. Wählen Sie als Installationstyp die **Arbeitsrechner-Installation**. Die Option setzt ein eingerichtetes Netzwerk voraus.



SICAT Suite-Setup: Auswahl des Installationstyps

Was mache ich mit der heruntergeladenen Installationsdatei?

Entpacken Sie die **zip-Datei** auf dem Rechner, auf dem Sie die SICAT Suite installieren wollen:

- Bei **lokaler Patientendatenhaltung** ist das der Rechner, auf dem Sie anschließend eine Einzelplatz-Installation durchführen.
- Bei **serverbasierter Patientendatenhaltung** ist das der Rechner, auf dem Sie eine Server-Installation durchführen und ein oder mehrere Arbeitsrechner, auf denen Sie eine Arbeitsrechner-Installation durchführen.

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU040

STAND: 2022-03-25

SEITE: 3 / 6

Wie installiere ich die SICAT Suite V2.0.40 als Einzelplatz-Installation?

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
2. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
3. Wählen Sie den Installations-Typ **Einzelplatz-Installation** im SICAT Suite-Setup.




Auswahl des Installationstyps: Einzelplatz-Installation

Wie installiere ich die SICAT Suite V2.0.40 in einem Netzwerk?

Auf dem Server-Rechner:


1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
2. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
3. Wählen Sie den Installations-Typ **Server-Installation** im SICAT Suite Setup.

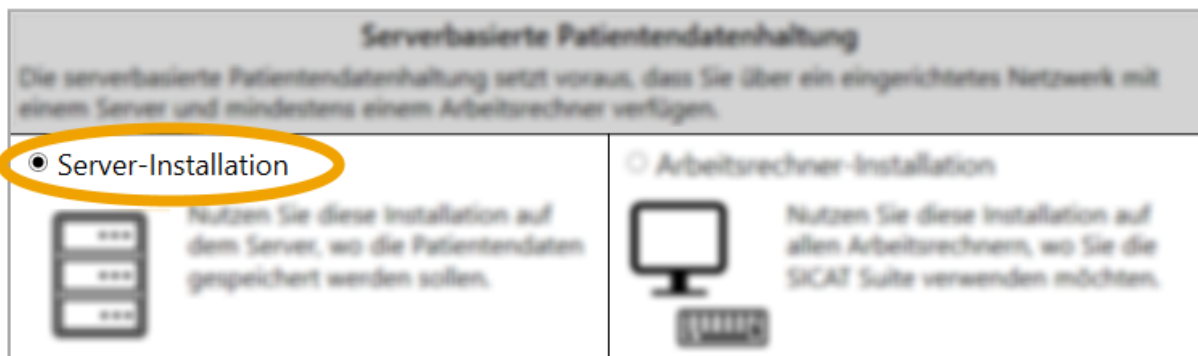

Auswahl des Installationstyps: Server-Installation

Auf einem oder mehreren Arbeitsrechnern:

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
2. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
3. Wählen Sie den Installations-Typ **Arbeitsrechner-Installation**.

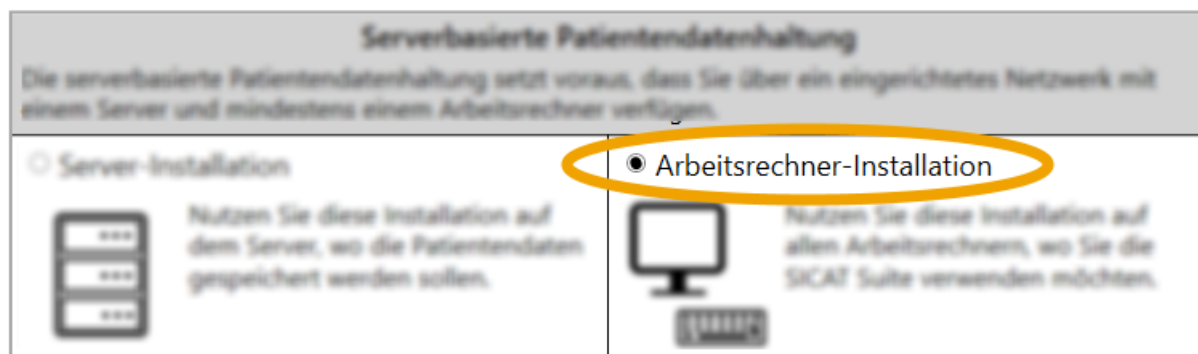

Auswahl des Installationstyps: Arbeitsrechner-Installation

Führen Sie die Arbeitsrechner-Installation **auf allen Arbeitsrechnern** durch, die Sie anschließend mit der Patientendatenbank auf dem Server-Rechner verbinden wollen.

SICAT

HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU040

STAND: 2022-03-25


SEITE: 4 / 6

Was muss ich nach der Installation beachten?

Wenn Sie sich für die **lokale Patientendatenhaltung** entschieden haben, wird die Patientendatenbank während dem ersten Start der SICAT Suite automatisch installiert und eingerichtet. Sie können die Datenbank sofort nutzen.

Wenn Sie sich für die **serverbasierte Patientendatenhaltung** entschieden haben, müssen Sie nach der Installation eine Verbindung zur Patientendatenbank auf dem Server-Rechner einrichten. Diese Verbindung muss auf allen Arbeitsrechnern eingerichtet werden. Siehe Abschnitt *Wie füge ich eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzu?*

Wie füge ich eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzu?

Klicken Sie in der Navigationsleiste in der SICAT Suite auf Einstellungen  und dann auf die Registerkarte **Patientendatenbank**. Klicken Sie auf **Verbindung hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen.

Was passiert, wenn ich noch keine Patientendatenbank eingerichtet habe?

Auf der Startseite der SICAT Suite erscheint ein Hinweis. Um bei serverbasierter Patientendatenhaltung auf Ihre Patientendaten zugreifen zu können, müssen Sie eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzufügen.

Kann ich die SICAT Suite auch ohne Lizenzen nutzen?

Ab der SICAT Suite V2.0.40 können Sie SICAT Planungsdaten ohne Lizenz anzeigen. Sie benötigen nicht zwingend eine Lizenz. Ist keine Lizenz auf Ihrem Rechner vorhanden, können Sie vorhandene Planungsdaten im so genannten **Viewer-Modus** ansehen.

Im Viewer-Modus können Sie **keine Planungen durchführen** und **keine Volumen ohne Planungsdaten** öffnen. Um Planungen durchführen zu können, muss auf Ihrem Rechner eine **Vollversions-Lizenz** vorhanden sein.

Wie erhalte ich Lizenzen für die SICAT Suite-Applikationen?

Um eine Lizenz zu erhalten, sind folgende Schritte notwendig:

1. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort.
2. Generieren Sie mit dem erhaltenen Voucher-Code einen Lizenzschlüssel im SICAT Portal.
3. Fügen Sie den Lizenzschlüssel zu Ihrem Aktivierungsschlüssel hinzu.
4. Aktivieren Sie Ihren Aktivierungsschlüssel in der SICAT Suite.

Detaillierte Informationen zum Thema **Lizenzen** finden Sie im Kapitel **Lizenzen** in den Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen.

Falls in Ihrem Land Abonnements für die SICAT Suite-Applikationen verfügbar sind, erhalten Sie dazu separate Informationen.

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG040


STAND: 2022-03-25

SEITE: 5 / 6

Wo finde ich die Gebrauchsanweisungen auf der SICAT Homepage?

1. Sie finden die Gebrauchsanweisungen auf www.sicat.com/suitemanuals.
2. Alternativ: SICAT Webseite (www.sicat.com)> Services > Download > Handbücher

Wo finde ich nach der Installation die Gebrauchsanweisungen als PDF-Datei in der SICAT Suite?

1. Klicken Sie in der **Navigationsleiste** der SICAT Suite auf das Symbol **Support**  oder drücken Sie die Taste F1.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gebrauchsanweisung anzeigen**.

SICAT 

 HERSTELLER

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

CE0197

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG040

STAND: 2022-03-25

SEITE: 6 / 6