

SICAT SMART EINRICHTEN

Mit **SICAT Smart** nutzen Sie die SICAT Suite-Applikationen auf Basis eines Abo-Programms.

In dieser **Kurzanleitung** erfahren Sie wie Sie **SICAT Smart** einrichten.

Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie bitte die komplette Kurzanleitung bevor Sie beginnen.
- Für eine umfassende Produktinformation nutzen Sie bitte die Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen. Diese stehen Ihnen online unter <https://www.sicat.de/handbuecher> zur Verfügung.

Schritt 1: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen

Bitte prüfen Sie ob der Rechner auf dem Sie **SICAT Smart** nutzen möchten die Systemvoraussetzungen erfüllt, die Sie online unter <https://www.sicat.de/produkte/#systemvoraussetzungen> finden.

Schritt 2: Registrieren Sie sich im SICAT Portal

1. Öffnen Sie die Internetseite <https://portal.sicat.com> in einem Webbrowser.
2. Wenn Sie sich noch nicht im **SICAT Portal** registriert haben, klicken Sie auf den Link **Als neuer Benutzer registrieren** und folgen Sie den Anweisungen. Andernfalls können Sie diesen Schritt überspringen.
Sie erhalten eine Bestätigungsmail und können sich ab sofort mit Ihren Zugangsdaten im **SICAT Portal** anmelden.

Schritt 3 (optional): Lösen Sie vorhandene Voucher ein

1. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im **SICAT Portal** an, klicken Sie auf dem Dashboard auf **Voucher einlösen** und folgen Sie den Anweisungen.
Sie werden automatisch zur Konfiguration von **SICAT Smart** (Schritt 4) weitergeleitet.

Schritt 4: Konfigurieren Sie SICAT Smart

1. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im **SICAT Portal** an und klicken Sie auf dem Dashboard auf **SICAT Smart**. Prüfen Sie Ihre Abo-Konfiguration, geben Sie Ihre Zahlungsinformationen ein und folgen Sie den Anweisungen.
Sie werden automatisch zum Download von **SICAT Connect** weitergeleitet.

Schritt 5: Installieren Sie SICAT Connect

1. Laden Sie **SICAT Connect** herunter und installieren Sie **SICAT Connect** auf allen Rechnern auf denen Sie die **SICAT Suite** nutzen wollen.
2. Um **SICAT Connect** mit Ihrem SICAT Portal-Konto zu verknüpfen, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten für das **SICAT Portal** in **SICAT Connect** an und folgen Sie den Anweisungen.
SICAT Connect prüft ob die **SICAT Suite** bereits auf Ihrem Rechner vorhanden ist. Falls nicht, werden Sie zum Download der **SICAT Suite** weitergeleitet.

Schritt 6: Installieren Sie die SICAT Suite

1. Laden Sie die **SICAT Suite** im **SICAT Portal** herunter.
2. Installieren Sie die **SICAT Suite** auf Ihrem Rechner.

Schritt 7: Installieren Sie die aktuelle SICAT Implant Database

Wenn Sie die neuesten Implantatreihen und Bohrhülsen in **SICAT Implant** nutzen wollen, müssen Sie zusätzlich das **aktuelle Update für die SICAT Implant Database** installieren. Das Update finden Sie unter <https://www.sicat.de/services/downloads/implantologie/>.

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DW40QUG001
STAND: 2023-04-24
SEITE: 1 / 1