

AKTUALISIERUNG VON SICAT SUITE V2.0.20 AUF SICAT SUITE V2.0.40

Diese Kurzanleitung gilt für alle SICAT Suite-Applikationen. Umfassende Produktinformationen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der SICAT Suite-Applikationen.

Sie erfahren wie Sie die SICAT Suite V2.0.20 auf die SICAT Suite V2.0.40 aktualisieren.

Wie werden Ihre Patientendaten in der SICAT Suite V2.0.40 verwaltet?

Seit der SICAT Suite V2.0.40 werden die Patientendaten in einer Patientendatenbank verwaltet, die von mehreren Benutzern gleichzeitig genutzt werden kann.

Damit keine Patientendaten verloren gehen, wird ein Datensatz beim Öffnen für andere Benutzer zur Bearbeitung gesperrt. Andere Benutzer können den bereits geöffneten Datensatz nur zur Ansicht öffnen.

Wie können mehrere Benutzer die Patientendatenbank nutzen?

Damit mehrere Benutzer die Patientendatenbank nutzen können, müssen die genutzten Rechner über ein Netzwerk miteinander kommunizieren.

Innerhalb des Netzwerks wird ein Rechner als Server für die Patientendatenbank eingerichtet. Die anderen Rechner verbinden sich anschließend über das Netzwerk mit der Patientendatenbank auf dem Server.

Wird das Netzwerk automatisch eingerichtet?

Die Einrichtung des Netzwerks muss erfolgreich abgeschlossen sein, bevor Sie die SICAT Suite innerhalb Ihres Netzwerks installieren und nutzen können. Gegebenenfalls müssen Sie dafür die Hilfe eines Technikers in Anspruch nehmen.

Kann ich die SICAT Suite auch ohne Netzwerk nutzen?

Ja, Sie können die SICAT Suite V2.0.40 auch als Einzelplatz-Installation nutzen. In diesem Fall wird die neue Patientendatenbank auf dem gleichen Rechner installiert, auf dem Sie anschließend mit den Patientendaten arbeiten.

Wie erhalte ich die SICAT Suite V2.0.40?



SICAT 

 HERSTELLER
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU042
STAND: 2022-03-25
SEITE: 1 / 7

Was ist das SICAT Portal?

Das SICAT Portal ist die zentrale passwortgeschützte Kundenwebsite von SICAT.

Folgende Funktionen stehen Ihnen im SICAT Portal zur Verfügung:

- SICAT Suite herunterladen
- Lizenzen einlösen
- Lizenzen verwalten
- Bestellungen von Bohrschablonen und Therapieschienen aufgeben und einsehen
- Verbrauchsmaterialien im SICAT Store kaufen

Wichtiger Hinweis: Die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung im SICAT Portal verwenden, wird für die Zustellung wichtiger Informationen genutzt. Bewahren Sie die E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort bitte sorgfältig auf, da Sie sich nur mit diesen Daten in Ihr SICAT Portal Konto einloggen können.

Wie melde ich mich im SICAT Portal an?

1. Öffnen Sie das **SICAT Portal** (www.portal.sicat.com).
2. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein.
3. **Falls Sie noch keine Zugangsdaten besitzen:** Klicken Sie auf den Link **Als neuer Benutzer registrieren** und geben Sie Ihre Daten ein. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail von SICAT, deren Erhalt Sie bestätigen müssen bevor Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im SICAT Portal anmelden und die Einrichtung Ihres SICAT Portal Konto abschließen können.

Wie erhalte ich die SICAT Suite Installationsdatei?

1. Öffnen Sie das SICAT Portal (www.portal.sicat.com) und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie auf der Startseite (Dashboard) auf **Download**.
3. Um die benötigte **zip-Datei** herunterzuladen, klicken Sie auf **SICAT Suite V2.0.40 herunterladen**

Die zip-Datei wird auf Ihrem Rechner gespeichert.

SICAT 

 **HERSTELLER**

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, DEUTSCHLAND

WWW.SICAT.COM

 **0197**

SOFTWARE-SUPPORT

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QUG042

STAND: 2022-03-25

SEITE: 2 / 7

Was muss ich vor der Aktualisierung beachten?

Bei der Installation der SICAT Suite V2.0.40 als Standalone-Version müssen Sie festlegen **wo Sie Ihre Patientendaten verwalten möchten**.

Sie können zwischen folgenden **zwei Optionen** wählen:

- **Lokale Patientendatenhaltung:** Die Patientendatenbank wird zusammen mit der SICAT Suite und der SICAT Implant Database auf dem Rechner installiert, auf dem Sie anschließend Ihre Patientendaten speichern und verwalten. Wählen Sie als Installationstyp die **Einzelplatz-Installation**.
- **Serverbasierte Patientendatenhaltung:** Im ersten Schritt wird die Patientendatenbank auf einem Server-Rechner installiert. Wählen Sie als Installationstyp die **Server-Installation**. Im zweiten Schritt werden die SICAT Suite und die SICAT Implant Database auf einem oder mehreren Arbeitsrechnern installiert. Wählen Sie als Installationstyp die **Arbeitsrechner-Installation**. Die Option setzt ein eingerichtetes Netzwerk voraus.



SICAT Suite-Setup: Auswahl des Installationstyps

Was mache ich mit der heruntergeladenen Installationsdatei?

Entpacken Sie die **zip-Datei** auf dem Rechner, auf dem Sie die SICAT Suite installieren wollen:

- Bei **lokaler Patientendatenhaltung** ist das der Rechner, auf dem Sie anschließend eine Einzelplatz-Installation durchführen.
- Bei **serverbasierter Patientendatenhaltung** ist das der Rechner, auf dem Sie eine Server-Installation durchführen und ein oder mehrere Arbeitsrechner, auf denen Sie eine Arbeitsrechner-Installation durchführen.

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU042
STAND: 2022-03-25
SEITE: 3 / 7

Was muss ich vor der Durchführung der Aktualisierung beachten?

Schließen Sie alle Bestellungen in der SICAT Suite ab, bevor Sie eine Aktualisierung durchführen.
Nicht abgeschlossene Bestellungen im Warenkorb gehen bei einer Aktualisierung verloren!

Wie aktualisiere ich einen einzelnen Rechner?

Wenn Sie die SICAT Suite nur auf einem Rechner installiert haben und auch weiterhin nur auf einem Rechner nutzen wollen, wählen Sie bei der Installation den Installationstyp **Einzelpplatz-Installation** im SICAT Suite-Setup.

Beim Update des Rechners wird die bisherige SICAT Suite-Installation mit allen Softwarekomponenten aktualisiert und die neue Patientendatenbank mit den benötigten Softwarevoraussetzungen zusätzlich auf dem Rechner installiert.

Sie können die vorhandene Patientendaten („Patientenaktenablagen“) in die neue Patientendatenbank („SICAT Patient Database“) übernehmen. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt *Wie übernehme ich Patientenakten aus SICAT Suite Version 2.0.20 oder älter?*

Wie aktualisiere ich mehrere Rechner zur anschließenden Nutzung mit zentraler Patientendatenhaltung?

Wenn Sie die SICAT Suite mit mehreren Benutzern und serverbasierter Patientendatenhaltung nutzen wollen, müssen Sie zuerst die Patientendatenbank auf einem Server-Rechner installieren. Wählen Sie bei der Installation auf dem Server-Rechner die Option **Server-Installation** im SICAT Suite-Setup.

Auf allen Rechnern, auf denen Sie die SICAT Suite nutzen wollen, wählen Sie bei der Installation die Option **Arbeitsrechner-Installation** im SICAT Suite-Setup. Dadurch wird die vorhandene SICAT Suite-Installation aktualisiert oder die SICAT Suite wird erstmalig installiert.

Nach Abschluss der Arbeitsrechner-Installation sind folgende Schritte **auf allen Arbeitsrechnern** erforderlich:

- Verbindung zur Patientendatenbank hinzufügen und aktivieren (einmalig beim ersten Start der SICAT Suite nach der Installation). Informationen dazu finden Sie im Abschnitt *Wie füge ich eine Verbindung zur Patientendatenbank hinzu?*
- Vorhandene Patientendaten („Patientenaktenablagen“) in die neue Patientendatenbank („SICAT Patient Database“) auf dem Server übernehmen. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt *Wie übernehme ich Patientenakten aus SICAT Suite Version 2.0.20 oder älter?*

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU042
STAND: 2022-03-25
SEITE: 4 / 7

Wie installiere ich die SICAT Suite V2.0.40 als Einzelplatz-Installation?

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
2. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
3. Wählen Sie den Installations-Typ **Einzelplatz-Installation** im SICAT Suite-Setup.




Auswahl des Installationstyps: Einzelplatz-Installation

Wie installiere ich die SICAT Suite V2.0.40 in einem Netzwerk?

Auf dem Server-Rechner:


1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
2. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
3. Wählen Sie den Installations-Typ **Server-Installation** im SICAT Suite Setup.

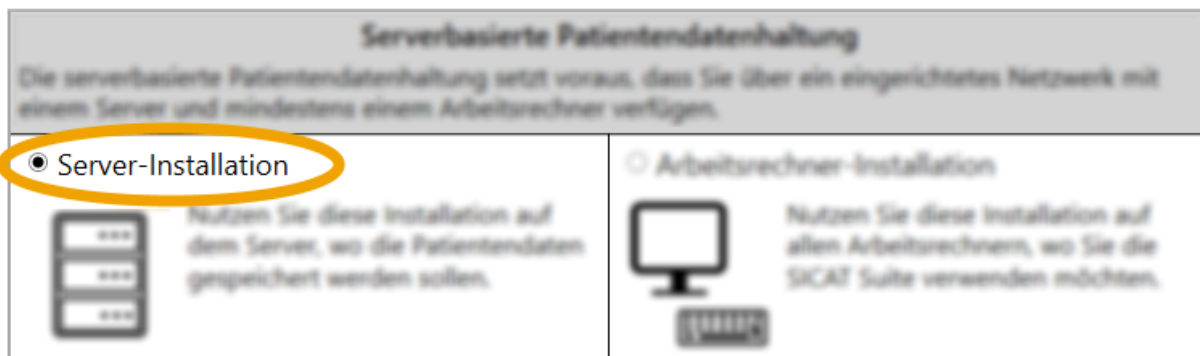

Auswahl des Installationstyps: Server-Installation

Auf einem oder mehreren Arbeitsrechnern:

1. Öffnen Sie den entpackten Ordner **SICAT Suite** im Windows Explorer.
2. Doppelklicken Sie die Datei **Setup.exe**.
3. Wählen Sie den Installations-Typ **Arbeitsrechner-Installation**.

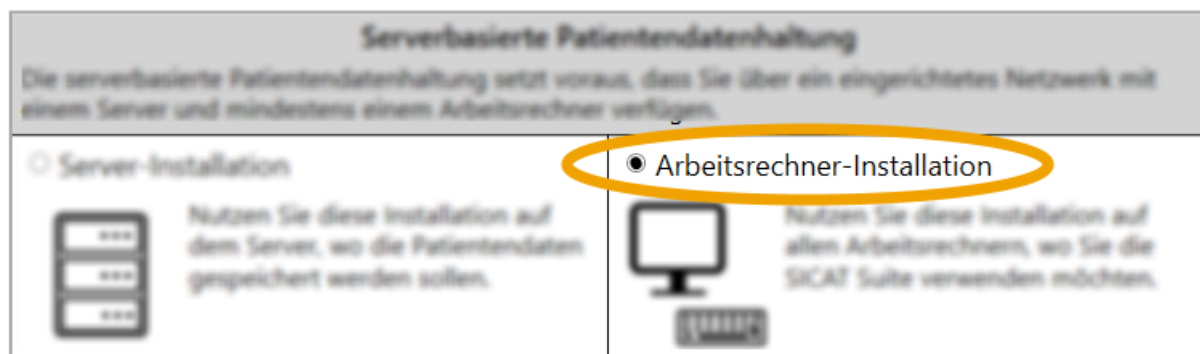

Auswahl des Installationstyps: Arbeitsrechner-Installation

Führen Sie die Arbeitsrechner-Installation **auf allen Arbeitsrechnern** durch, die Sie anschließend mit der Patientendatenbank auf dem Server-Rechner verbinden wollen.

SICAT

HERSTELLER
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU042
STAND: 2022-03-25
SEITE: 5 / 7

Was muss ich nach der Installation beachten?

Wenn Sie sich für die **lokale Patientendatenhaltung** entschieden haben, wird die Patientendatenbank während dem ersten Start der SICAT Suite automatisch installiert und eingerichtet. Sie können die Datenbank sofort nutzen.

Wenn Sie sich für die **serverbasierte Patientendatenhaltung** entschieden haben, müssen Sie nach der Installation eine Verbindung zur Patientendatenbank auf dem Server-Rechner einrichten. Diese Verbindung muss auf allen Arbeitsrechnern eingerichtet werden. Siehe Abschnitt *Wie füge ich eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzu?*

Wie füge ich eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzu?

Klicken Sie in der Navigationsleiste in der SICAT Suite auf Einstellungen  und dann auf die Registerkarte **Patientendatenbank**. Klicken Sie auf **Verbindung hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen.

Was passiert, wenn ich noch keine Patientendatenbank eingerichtet habe?

Auf der Startseite der SICAT Suite erscheint ein Hinweis. Um bei serverbasierter Patientendatenhaltung auf Ihre Patientendaten zugreifen zu können, müssen Sie eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzufügen.

Wie kann ich meine alten Patientendaten weiter nutzen?

Um die Patientendaten aus früheren Versionen der SICAT Suite („Patientenaktenablagen“) weiter nutzen zu können, müssen sie in die neue Patientendatenbank („SICAT Suite Patient Database“) übernommen werden.

Wichtige Hinweise:

- Wenn Sie die vorhandenen Patientendaten nicht übernehmen, können Sie nach dem Update nicht mehr auf diese Daten zugreifen.
- Informationen zur Übernahme der Daten finden Sie im Abschnitt *Wie übernehme ich Patientendaten aus SICAT Suite Version 2.0.20 oder älter?*

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT




DA50QUG042
STAND: 2022-03-25
SEITE: 6 / 7

Wie übernehme ich Patientendaten aus SICAT Suite Version 2.0.20 oder älter?

Sie müssen bereits eine Verbindung zur neuen Patientendatenbank hinzugefügt und aktiviert haben. Siehe Abschnitt *Wie füge ich eine Verbindung zu einer Patientendatenbank hinzu?*

Um die Übernahme der Patientendaten zu starten, öffnen Sie die Einstellungen der SICAT Suite , wählen Sie die Registerkarte **Patientendatenbank** und klicken Sie auf **Patientendaten übernehmen**.

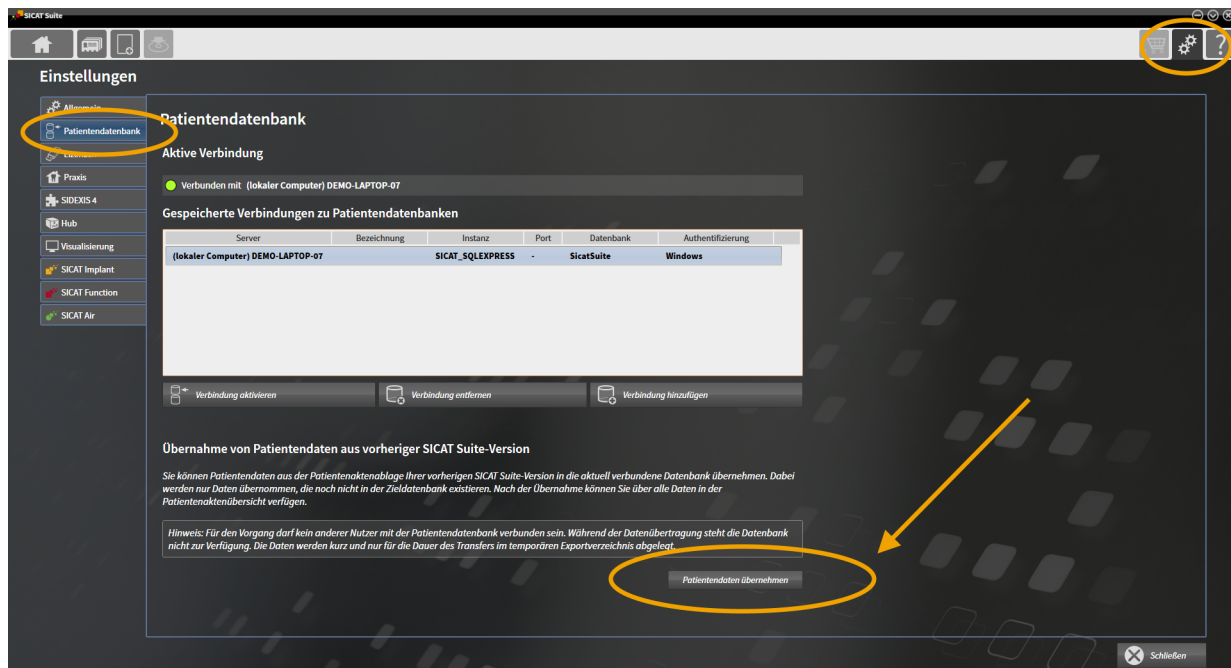

SICAT Suite-Einstellungen: Fenster **Patientendatenbank**

Wichtiger Hinweis:

- Es werden nur die Patientendaten übernommen, die noch nicht in der neuen Patientendatenbank vorhanden sind.
- Wenn Sie bisher **mehrere Patientenaktenablagen** verwendet haben, können Sie alle Patientenaktenablagen nacheinander in die neue Patientendatenbank überführen.

Wie wirkt sich die Aktualisierung auf die vorhandenen Lizenzen aus?

Sie können Ihre Vollversions- und Viewer-Lizenzen ohne Einschränkung weiternutzen.

Wo finde ich die Gebrauchsanweisungen auf der SICAT Homepage?

1. Sie finden die Gebrauchsanweisungen auf www.sicat.com/suitemanuals.
2. Alternativ: SICAT Webseite (www.sicat.com) > Services > Download > Handbücher

Wo finde ich nach der Installation die Gebrauchsanweisungen als PDF-Datei in der SICAT Suite?

1. Klicken Sie in der **Navigationsleiste** der SICAT Suite auf das Symbol **Support**  oder drücken Sie die Taste F1.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gebrauchsanweisung anzeigen**.

SICAT 

 **HERSTELLER**
SICAT GMBH & CO. KG
FRIESDORFER STR. 131-135
53175 BONN, DEUTSCHLAND
WWW.SICAT.COM

CE 0197

SOFTWARE-SUPPORT
WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT



DA50QU042
STAND: 2022-03-25
SEITE: 7 / 7